

Макет упаковки насадок сменных для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жестких)



Макет упаковки насадок сменных для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жестких) (Боковые стороны)


В упаковке содержатся десять одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным "Отривин Бэби", который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование.

Насадки сменные вместе с аспиратором назальным "Отривин Бэби" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

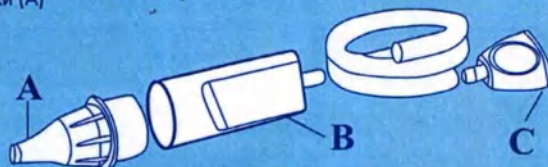

Насадки сменные для аспиратора назального "Отривин Бэби" (жесткие) – 10 шт.

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия.

Используйте сменные насадки только с соответствующим аспиратором, поставляемым производителем отдельно.

Не используйте сломанное или поврежденное изделие или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора и сменных насадок после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Проводите аспирацию у ребенка в положении лежа или полулежа, надежно удерживая мундштук между губами. В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Состав: полипропилен, меламиновая пена.

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности 5 лет.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01134 от XX.XX.XXXX.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус»,
Российская Федерация, 123112,
г. Москва, наб. Пресненская, д. 10,
помещ. III, комната 9, эт. 6.

Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной «Горячей линии»:

☎ 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

«Отривин Бэби Комфорт» (мягких)



Макет упаковки насадок сменных для аспиратора назального

«Отривин Бэби Комфорт» (мягких)

(Задняя и боковая панели)

Насадки сменные для аспиратора назального "Отривин Бэби Комфорт" (мягкие) – 10 шт.

Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °C до 30 °C.

Срок годности 3 года.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Медицинское изделие, рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01134 от XX.XX.XXXX.

Место производства: Стипластикс, 62 Чемин дес Плантес, 38160 Сен-Марселлен, Франция.
Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.

Производитель: Хелеон КХ САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal Manufacturer: Haeon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус», Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6.

Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной «Горячей линии»:

☎ 8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haeon.com

В упаковке содержатся десять мягких одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным "Отривин Бэби Комфорт", который приобретается отдельно.

Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование.

Насадки сменные вместе с аспиратором назальным "Отривин Бэби Комфорт" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.


Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби Комфорт" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби".

Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия.

Используйте сменные насадки только с соответствующим аспиратором, поставляемым производителем отдельно.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора и сменных насадок после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Состав: поливинилхлорид, меламиновая пена.

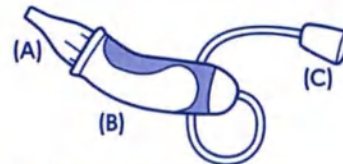

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.

3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.

4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).

5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.

6. Повторите процедуру для другого носового хода.

7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

Не используйте сломанное или поврежденное изделие или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром.

Проводите аспирацию у ребенка в положении лежа или полулежа, надежно удерживая мундштук между губами.

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

ПРОШИТО И ОПЕЧАТАНО 4
ЛИСТА (-ОВ)

Верность копий документов и подлинность
оригиналов удостоверяю.

Специалист по регистрации

АО «Хелеон Рус»

/ М.Ю. Комарова /

М.П. 10 2024 г.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Насадки сменные для аспиратора назального
«Отривин Бэби» (жесткие)



Фотографическое изображение медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби» (жесткие) в упаковке

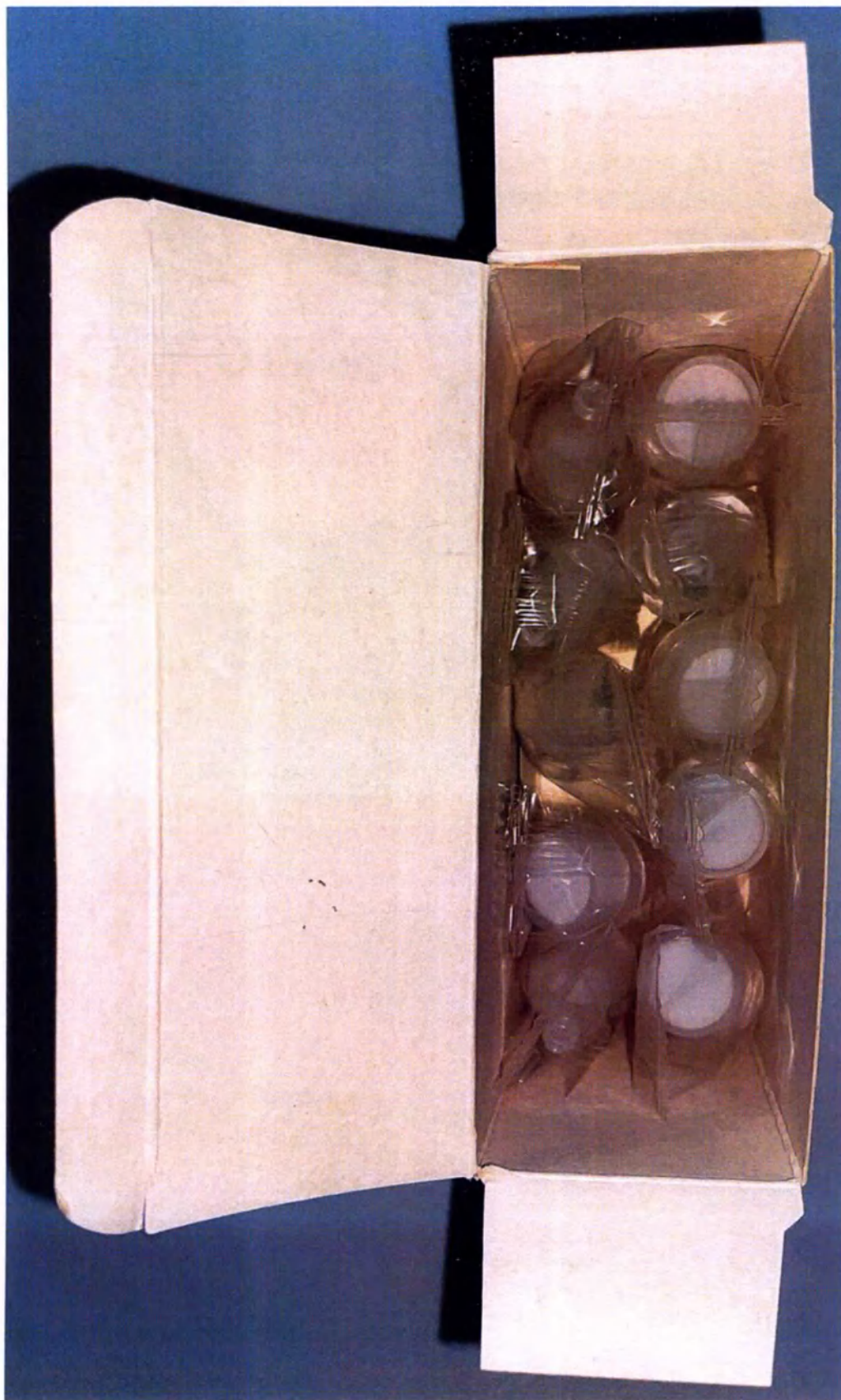

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального

«Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)



Фотографическое изображение медицинского изделия
Насадки сменные для аспиратора назального «Отривин Бэби Комфорт» (мягкие) в
упаковке



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального

«Отривин Бэби» (жесткие)



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального

«Отривин Бэби Комфорт» (мягкие)

