



НСС Меделен

Наборы сухих солей
для приготовления
концентрированных
гемодиализирующих
растворов



НСС Меделен

Запатентовано в РФ
ТУ 9398-001-50861859-2004
Регистрационное удостоверение
№ ФС 010343 16/0756-04 от 22.10.2004
Сертификат соответствия
Госстандарта РФ
№ РОСС RU.0001.11ИМ02

www.nephron.ru

Новая,
еще более удобная
для потребителя
упаковка.

Ионный состав
гемодиализирующего
раствора теперь указан
прямо на этикетке.

Прочный, плотно
закрывающийся пластиковый
контейнер с эргономичными
ручками, который можно
в дальнейшем использовать
для различных нужд.

Упаковка на
25, 50 и 100 л
готового
раствора.

Высокая
стабильность
готового
концентрата.

Базовые прописи



КИСЛОТНЫЙ КОМПОНЕНТ КК-А-1 И БИКАРБОНАТНЫЙ КОМПОНЕНТ ВК-В-1 для бикарбонатного гемодиализа

Базовый состав гемодиализирующих растворов после разведения
гемодиализным аппаратом: кислотный компонент КК-А-1 совместно
с бикарбонатным компонентом ВК-В-1 в пропорции 1:1,225:32,775

ШИФР	Na ⁺ , ммоль/л	K ⁺ , ммоль/л	Ca ⁺⁺ , ммоль/л	Mg ⁺⁺ , ммоль/л	Cl ⁻ , ммоль/л	HCO ₃ ⁻ , ммоль/л	CH ₃ COO ⁻ , ммоль/л
КК-А-1	138,0	2,0	1,75	0,5	109,5	32,0	3,0



Состав концентрированного бикарбонатного компонента ВК-В-1 Na⁺: 1000,0 ммоль/л HCO₃⁻: 1000,0 ммоль/л

КИСЛОТНЫЙ КОМПОНЕНТ КК-А-2 И БИКАРБОНАТНЫЙ КОМПОНЕНТ ВК-В-2 для бикарбонатного гемодиализа

Базовый состав гемодиализирующих растворов после разведения
гемодиализным аппаратом: кислотный компонент КК-А-2 совместно
с бикарбонатным компонентом ВК-В-2 в пропорции 1:1,83:34

ШИФР	Na ⁺ , ммоль/л	K ⁺ , ммоль/л	Ca ⁺⁺ , ммоль/л	Mg ⁺⁺ , ммоль/л	Cl ⁻ , ммоль/л	HCO ₃ ⁻ , ммоль/л	CH ₃ COO ⁻ , ммоль/л
КК-А-2	140,0	2,0	1,75	0,5	107,5	34,0	5,0



Состав концентрированного бикарбонатного компонента ВК-В-2 Na⁺: 1310 ммоль/л HCO₃⁻: 786 ммоль/л Cl⁻: 524 ммоль/л

АЦЕТАТНЫЙ КОМПОНЕНТ АК-С-1 для ацетатного гемодиализа

Базовый состав ацетатного компонента
гемодиализирующего раствора после разведения в пропорции 1:34

ШИФР	Na ⁺ , ммоль/л	K ⁺ , ммоль/л	Ca ⁺⁺ , ммоль/л	Mg ⁺⁺ , ммоль/л	Cl ⁻ , ммоль/л	CH ₃ COO ⁻ , ммоль/л
АК-С-1	140,0	2,0	1,75	0,75	112,0	35,0

С помощью калькулятора (www.nephron.ru/catalog/nss/nsscalc.php)
Вы можете оценить ежемесячную потребность Вашего отделения
гемодиализа в НСС "Меделен" в зависимости от типа
и продолжительности сеанса гемодиализа,
а также числа диализов в неделю.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(812) 380-88-28,
(812) 325-45-20,
office@nephron.ru

МОСКВА

(095) 772-45-83,
(095) 698-06-31