

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ С ГЛЮКОЗОЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА»

КДР-Г «КРЕБСОЛ»

Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» ККГ-А-1

объем 10 литров

Ионный состав концентрированного раствора, ммоль/л

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	Глюкоза
3605,0	70,0	61,25	17,5	3832,5	105,0	194,2

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента ККГ-А-1 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	Глюкоза	HCO ₃ ⁻
138,0	2,0	1,75	0,5	109,5	3,0	5,55	32,0

Способ применения:

Открыть канистру с КДР, вставить заборное устройство гемодиализного аппарата.

Забор концентрированного раствора и его разбавление производить в автоматическом режиме в соответствии с инструкцией к гемодиализному оборудованию.

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при t от 0⁰ до 30⁰С.



НЕФРОН

ТУ 9398-005-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ
С ГЛЮКОЗОЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА»
КДР-Г «КРЕБСОЛ»

Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» ККГ-А-2
объем 10 литров

Ионный состав концентрированного раствора, ммоль/л

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	Глюкоза
2762,5	73,75	62,61	18,5	2997,7	147,3	204,4

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения
гемодиализным аппаратом кислотного компонента ККГ-А-2 в

пропорции 1/36,83, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л:

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	Глюкоза	HCO ₃ ⁻
140,0	2,0	1,7	0,5	107,4	4,0	5,55	35

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых
складских отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при
t от 0° до 30°С.



®

НЕФРОН

Способ применения:

Открыть канистру с КДР, вставить
заборное устройство
гемодиализного аппарата.
Забор концентрированного раствора и его
разбавление производить в
автоматическом режиме в
соответствии с инструкцией
к гемодиализному оборудованию.

ТУ 9398-005-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ С ГЛЮКОЗОЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР-Г «КРЕБСОЛ»

Кислотный компонент «ЦИТРАТ» ККГ-Ал-1

Объем 10 литров

Исходный состав концентрированного раствора, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^-	CH_3COO^-	Цитрат	Глюкоза
15,5	70,	6,25	170	3832,5	10,5	31,5	194,2

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Исходный состав гемодиализирующего раствора после разведения

гемодиализным аппаратом кислотного компонента ККГ-Ал-1 в

пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

Na^+	K^+	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^-	CH_3COO^-	Цитрат	Глюкоза	HCO_3^-
13,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,9	5,55	32,0

Способ применения:

Открыть канистру с КДР, вставить заборное устройство гемодиализного аппарата. Забор концентрированного раствора и его разбавление производить в автоматическом режиме в соответствии с инструкцией к гемодиализному оборудованию.

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при температуре от 0° до 30°С.



НЕФРОН

ТУ 9398-005-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ С ГЛЮКОЗОЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР-Г «КРЕБСОЛ» Кислотный компонент «АЦИДОСУКЦИНАТ» ККГ-Ауя-1

Объем 10 литров

Исходный состав концентрированного раствора, ммоль/л

	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	Сукцинат	Глюкоза
Исходный	70,0	61,25	17,5	3832,5	74,2	15,4	194,2

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Исходный состав гемодиализирующего раствора после разведения

гемодиализным аппаратом кислотного компонента ККГ-Ауя-1 в

пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	Сукцинат	Глюкоза	HCO ₃ ⁻
138,0	2,0	1,75	0,5	109,5	2,12	0,44	5,55	32,0

Способ применения:

Открыть канистру с КДР-г, вставить заборное устройство гемодиализного аппарата. Забор концентрированного раствора и его разбавление производить в автоматическом режиме в соответствии с инструкцией к гемодиализному оборудованию.

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при температуре от 0° до 30°С.



НЕФРОН

ТУ 9398-005-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ ГЛЮКОЗОЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР-г «КРЕБСОЛ»

Кислотный компонент «АЦИДОСОЛ» ККг-Ах-1 объем 10 литров

Ионный состав концентрированного раствора, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^-	Кислотный ион	Глюкоза
105,0	70,0	61,25	17,5	3937,0	105,0	194,2

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения
гемодиализным аппаратом кислотного компонента ККг-Ах-1 в
пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

Na^+	K^+	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^-	Кислотный ион	Глюкоза	HCO_3^-
138,0	2,0	1,75	0,5	112,5	3,0	5,55	32,0

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых
складских отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при
температуре от 0° до 30°С.

Способ применения:

Открыть канистру с КДР-г, вставить заборное
устройство гемодиализного аппарата.
Забор концентрированного раствора и его
разбавление производить в автоматическом
режиме в соответствии с инструкцией
к гемодиализному оборудованию.



НЕФРОН

ТУ 9398-005-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro применения

В документе прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Ген. директор

Д.Б. Сапожников

