

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ИЛ
ООО «Полимертест» СПбТихомирова Т.И.
« 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Новые медицинские технологии»

Васютина О.В./

« 2012 г.

М.П.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ **MERCATOR MEDICAL** ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА И СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ (нитрил, винил, полихлоропрен, полиизопрен) нестерильные, в том числе, в вариантах исполнения:

1. Перчатки диагностические Santex латексные опудренные
2. Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные
3. Перчатки диагностические Comfort латексные текстурированные
4. Перчатки диагностические Comfort PF латексные текстурированные неопудренные
5. Перчатки диагностические Comfort Blue латексные текстурированные неопудренные
6. Перчатки диагностические Dermagel латексные текстурированные с внутренним синтетическим покрытием
7. Перчатки диагностические Texident латексные текстурированные
8. Перчатки диагностические Texident PF латексные текстурированные с внутренним полимерным покрытием
9. Перчатки диагностические Texident Mint латексные текстурированные с запахом мяты
10. Перчатки диагностические Ambulance PF латексные повышенной прочности
11. Перчатки диагностические Nitrylex PF нитриловые неопудренные
12. Перчатки диагностические Nitrylex PF Chemo нитриловые неопудренные
13. Перчатки диагностические Nitrylex PF Protect нитриловые неопудренные
14. Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные
15. Перчатки диагностические Vinylex Blue виниловые

Назначение: изделия предназначены для использования в медицинской практике для защиты рук персонала.

Ограничения: безвредно для человеческого организма, в редких случаях может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к компонентам латекса. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если возникла аллергическая реакция.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

«СОГЛАСОВАНО» Руководитель ИЛ ООО «Полимертест» СПб Тихомирова Т.И. «__» _____ 2012 г. М.П.	«УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «Новые медицинские технологии» _____/ Васютина О.В./ «__» _____ 2012 г. М.П.
---	--

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ **MERCATOR MEDICAL** ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА И СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ (нитрил, винил, полихлоропрен, полиизопрен) нестерильные, в том числе, в вариантах исполнения:

1. Перчатки диагностические Santex латексные опудренные
2. Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные
3. Перчатки диагностические Comfort латексные текстурированные
4. Перчатки диагностические Comfort PF латексные текстурированные неопудренные
5. Перчатки диагностические Comfort Blue латексные текстурированные неопудренные
6. Перчатки диагностические Dermagel латексные текстурированные с внутренним синтетическим покрытием
7. Перчатки диагностические Texident латексные текстурированные
8. Перчатки диагностические Texident PF латексные текстурированные с внутренним полимерным покрытием
9. Перчатки диагностические Texident Mint латексные текстурированные с запахом мяты
10. Перчатки диагностические Ambulance PF латексные повышенной прочности
11. Перчатки диагностические Nitrilex PF нитриловые неопудренные
12. Перчатки диагностические Nitrilex PF Chemo нитриловые неопудренные
13. Перчатки диагностические Nitrilex PF Protect нитриловые неопудренные
14. Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные
15. Перчатки диагностические Vinylex Blue виниловые

Назначение: изделия предназначены для использования в медицинской практике для защиты рук персонала.

Ограничения: безвредно для человеческого организма, в редких случаях может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к компонентам латекса. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если возникла аллергическая реакция.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Перчатки диагностические Santex латексные опудренные

Перчатки диагностические из натурального латекса, нестерильные, опудренные.

поверхность: гладкая

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,08мм
цвет: белый
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL - размер перчаток различается по цвету упаковки
AQL: 1,5
содержание протеинов: <150 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

2. Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные

Перчатки диагностические из натурального латекса, нестерильные, опудренные.

поверхность: гладкая
длина: 240мм
толщина среднего пальца: 0,08мм
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL - размер перчаток различается по цвету упаковки
цвет: белый
AQL: 1,5
содержание протеинов: <150 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

3. Перчатки диагностические Comfort латексные текстурированные

Перчатки диагностические из натурального латекса, нестерильные, опудренные.

поверхность: гладкая
длина: 240мм
толщина среднего пальца: 0,08мм
цвет: белый
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL - размер перчаток различается по цвету упаковки
AQL: 1,5
содержание протеинов: <150 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

4. Перчатки диагностические Comfort PF латексные текстурированные неопудренные

Неопудренные медицинские перчатки из натурального латекса. Текстурированные по всей поверхности. Двойного хлорирования для лучшей работы с мелкими инструментами.

форма: универсальная, на обе руки
длина: 240мм
толщина среднего пальца: 0,08мм
цвет: кремовый
размеры: XS, S, M, L, XL
AQL: 1,5
содержание протеинов: <50 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

5. Перчатки диагностические Comfort Blue латексные текстурированные опудренные

Опудренные медицинские перчатки из натурального латекса. Голубого цвета для антибликового эффекта. Гладкая наружная поверхность.

форма: универсальная, на обе руки

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,08мм

цвет: голубой

размеры: XS, S, M, L, XL - размер перчаток различается по цвету упаковки

AQL: 1,5

содержание протеинов: <150 мкг/г

гарантия качества: 5 лет

6. Перчатки диагностические Dermagel латексные текстурированные с внутренним синтетическим покрытием

Неопудренные медицинские перчатки из натурального латекса с полимерным нитриловым внутренним слоем. Текстурированные по всей поверхности.

Нитриловый внутренний слой обеспечивает легкое надевание перчатки даже на влажные руки и защиту от протеинов натурального латекса

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,08мм

цвет: кремовый

форма: универсальная, на обе руки

размеры: XS, S, M, L, XL

AQL: 1,5

содержание протеинов: <50 мкг/г

гарантия качества: 5 лет

7. Перчатки диагностические Texident латексные текстурированные

Перчатки диагностические из натурального латекса, нестерильные, опудренные, рекомендованы для стоматологов.

поверхность: микротекстурированная

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,08мм

цвет: белый

форма: универсальная, на обе руки

размеры: XS, S, M, L, XL

AQL: 1,5

содержание протеинов: <150 мкг/г

гарантия качества: 5 лет

8. Перчатки диагностические Texident PF латексные текстурированные с внутренним полимерным покрытием

Неопудренные медицинские перчатки из натурального латекса с внутренним полимерным покрытием. Микротекстурированные по всей поверхности.

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,08мм

цвет: кремовый
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL
AQL: 1,5
содержание протеинов: <50 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

9. Перчатки диагностические Texident Mint латексные текстурированные с запахом мяты

Перчатки диагностические из натурального латекса, нестерильные, опудренные. Специальные перчатки с запахом мяты, рекомендованы для стоматологов.
поверхность: текстурированная
длина: 240мм
толщина среднего пальца: 0,08мм
цвет: зеленый
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL
AQL: 1,5
содержание протеинов: <150 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

10. Перчатки диагностические Ambulance PF латексные повышенной прочности

Неопудренные перчатки повышенной прочности. Текстурированная поверхность. Исключительная устойчивость к разрывам и проколам. Синего цвета для антибликового эффекта.
длина: 295мм
толщина среднего пальца: 0,33мм
цвет: синий
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL
AQL: 1,5
содержание протеинов: <50 мкг/г
гарантия качества: 5 лет

11. Перчатки диагностические Nitrilex PF нитриловые неопудренные

Неопудренные нитриловые медицинские перчатки. Текстурированные по всей поверхности. Прочные, эластичные и обладают отличной устойчивостью к спиртам, кетонам, эфирам.
длина: 240мм
толщина среднего пальца: 0,12мм
цвет: голубой
форма: универсальная, на обе руки
размеры: XS, S, M, L, XL
AQL: 1,5

содержание протеинов: отсутствует
гарантия качества: 5 лет

12. Перчатки диагностические Nitrylex PF Chemo нитриловые неопудренные

Неопудренные нитриловые медицинские перчатки повышенной устойчивости к химическим веществам.

Применяются для защиты от агрессивных химических сред, работы с цитостатиками, лабораторных процедур. Голубого цвета для антибликового эффекта.

длина: 300мм

толщина среднего пальца: 0,08мм

цвет: голубой

форма: универсальная, на обе руки

размеры: XS, S, M, L, XL

AQL: 1,5

содержание протеинов: отсутствует

гарантия качества: 5 лет

13. Перчатки диагностические Nitrylex PF Protect нитриловые неопудренные

Неопудренные облегчённые нитриловые перчатки для медицинских манипуляций, а также пищевых производств и хозяйственных нужд. Высокочувствительные, текстурированные на пальцах.

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,09мм

цвет: голубой или белый

форма: универсальная, на обе руки

размеры: XS, S, M, L, XL

AQL: 1,5

содержание протеинов: отсутствует

гарантия качества: 5 лет

14. Перчатки диагностические Vinylex PF виниловые неопудренные

Перчатки виниловые диагностические, нестерильные, неопудренные. Рекомендованы людям, обладающим повышенной чувствительностью к латексу.

сырьё: поливинилхлорид

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,09мм

поверхность: гладкая

форма: универсальная, на обе руки

размеры: XS, S, M, L, XL

AQL: 1,5

содержание протеинов: отсутствует

гарантия качества: 5 лет

15. Перчатки диагностические Vinylex Blue виниловые

Перчатки виниловые диагностические, нестерильные, опудренные, голубого цвета.

сырье: поливинилхлорид

длина: 240мм

толщина среднего пальца: 0,09мм

поверхность: гладкая

форма: универсальная, на обе руки

размеры: XS, S, M, L, XL

AQL: 1,5

содержание протеинов каучукового латекса: отсутствует

гарантия качества: 5 лет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Запрещается использовать изделие, если:

- истёк допустимый срок хранения изделия, указанный на упаковке,
- нарушена целостность упаковки,
- упаковка находится во влажном состоянии (подмочена).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:

- a. вымыть руки перед использованием изделия;
- b. открыть общую упаковку с изделиями;
- c. достать изделие из общей упаковки.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- a. после извлечения изделия из упаковки, использовать по назначению;
- b. изделие не использовать повторно.
- c. не использовать изделие более 2 часов подряд

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и при нагревания более 37 гр.С.
- a. Упаковки с изделиями необходимо предохранять от загрязнения, запыления, попадания влаги и от разрыва.
- b. При отсутствии нарушений внешнюю упаковку вскрывают и содержащиеся в ней изделия используют по назначению.

Директор
«Новые медицинские
технологии»
Васютина Оксана
Генеральный

