



Инструкция по применению

Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов

классов А, Б, В, Г «МедКом»

ТУ 9398-002-63102960-2012

Варианты исполнения :

1. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом», размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
2. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом», с замками-стяжками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
3. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом», с бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
4. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом», с замками-стяжками и бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
5. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
6. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, с замками-стяжками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
7. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, с бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.
8. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, с замками-стяжками и бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.

Назначение: Одноразовые пакеты, используются для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г.

Характеристики пакетов:

Размеры пакетов: по ширине от 280 мм до 1350 мм, по длине от 300 мм до 1500 мм.

Толщина пленки из которой изготовлен пакет: от 7 до 160 мкм.

Ширина фальца: от 80 до 160 мм.

На пакетах, поставляемых в виде рулонов, параллельно донному шву расположена линия отрыва в виде перфорации.

На пакете расположено информационное окно, содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата сбора, ФИО ответственного лица за сбор отходов.

Пакеты могут быть оснащены:

- специальными замками-стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения;
- бирками с информационным окном с информацией: код подразделения ЛПУ, название ЛПУ, дата сбора, ответственное лицо, упрощающими процесс маркировки.

Пакеты в зависимости от классификации медицинских отходов выпускаются следующих цветов:

- для отходов класса А – белого цвета
- для отходов класса Б – желтого цвета
- для отходов класса В – красного цвета
- для отходов класса Г – черного цвета.

При соблюдении всех правил герметизации использование пакетов снижает до 0 % риск распространения инфекции за пределы ЛПУ. Одноразовые пакеты обладают высокой прочностью и герметичностью.

Внимание!

1. Запрещается использовать пакеты не по назначению.
2. При сборе медицинских отходов запрещается:
 - Пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одного пакета в другой;
 - Утрамбовывать любые отходы руками;
 - Осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды.
 - Складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы.
3. Повторное использование пакетов не допускается.
4. Масса собираемых отходов в 1 пакет не должна превышать 10 кг.

Алгоритм сбора отходов:

1. Достаньте пакет нужного вам типоразмера и класса опасности из упаковки.
2. Расправьте пакет и раскройте его по горловине.
3. Руками придайте ему округлую форму.
4. Вставьте его в подходящую по размеру тару.
5. Для фиксации пакета загните его края по краю тары.
6. Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
7. Заполните пакет отходами соответствующего класса опасности не более чем на $\frac{3}{4}$. Следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментарий.
8. Наденьте бирку на замок-стяжку.
9. Соберите края пакета и выпустите из него воздух.
10. Перекрутите горловину пакета, произведите герметизацию путем завязывания или закрытия с использованием замка-стяжки или других приспособлений, исключающих высыпание отходов.
11. Пакет готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов на территории ЛПУ.

Комплект поставки:

- пакеты одного размера и одного назначения в кол-ве в зависимости от заказа;
- замок-стяжка в зависимости от варианта исполнения в кол-ве в зависимости от заказа;
- бирка в зависимости от варианта исполнения в кол-ве в зависимости от заказа;
- инструкция по применению – вложенная в упаковку или размещенная на упаковке.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации:

Пакеты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта по условиям хранения 2 ГОСТ 15150, но при температуре от -40°C до +40°C.

Пакеты хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

при температуре от 5 до 40 °С. Пакеты должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Допускается хранение пакетов в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °С не более 1 месяца.

Упакованные изделия укладывают в штабеля на стеллажах. Расстояние от пола до нижнего стеллажа должно быть не менее 1 м.

Пакеты, транспортируемые при температуре ниже 0 °С, перед применением следует выдержать при температуре 5 до 40 °С в течение суток .

Температура упаковываемого в пакет продукта не должна превышать 60°С.

Пакеты должны использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Утилизация: Утилизация пакетов осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель:

ООО «НПФ «МедКом», 422701, РТ, с. Высокая Гора, ул. Полковая, 4

Тел.: (843) 537-10-46, 537-10-56

info@medkom-npf.ru

www.medkom-npf.ru

Дата последнего пересмотра инструкции: 19.10.2017

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (Четаре) листов
Должность Директор
ООО "НТБ-МедКом"
Подпись С. С. Савва

