

Система сорбционная стерилизации баротриппом с оловянным анодом серебра, 10/10/15/6 см.
(У 9303-002-20/10444-2011).

Производитель: Закрытое Акционерное Общество «Сибирский центр высокотехнологичной технологии» (ЗАО «СЦТТ»), Россия, 630051, г.Новосибирск, пр.Демократический, 81, корп. 2.
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, Кривой переулок, 151б, оф.33, тел. (383) 226-86-77.

"стерильно" антисептично" "источник"
STERIL GO

для стерилизации – см. на упаковке.

дата изготовления и номер партии – см. на упаковке.

срок хранения – 5 лет.

Состоит из стерильного нетканого материала различной плотности, баротриппом (полиэстероформный полимер) с распределенными анодами серебра. Для терапии ран во влажной среде, для местного лечения трофических язв, пролежней и других плохо заживающих ран различного происхождения, для лечения ожогов, обморожений, экзем, экзем.

Сорбционная основа сорбента впитывает экссудат и удерживает его внутри ран.

Противопоказания и применение: индивидуальная гиперчувствительность.

Порядок работы:

1. Обработайте рану и прилегающий к ней участок кожи дезинфицирующим раствором.
2. При присыхающем истончающемся агглютинативе средств, обработайте рану физиологическим раствором.
3. Рана и прилегающий к ней участок кожи должны быть сухими.
4. Достаньте сорбент из стерильной упаковки.
5. Наклейте сорбент на рану.
6. Зафиксируйте сорбент бинтом или лейкопластырем.
7. Смену повязки необходимо проводить в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70% и быть защищены от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, и быть защищены от воздействия пыли, насекомых, грызунов, птиц, насекомых, и быть защищены от воздействия влаги.

Транспортировать изделия следует транспортным средством в кратчайшие сроки при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70%, по истечении срока годности или при нарушении целостности упаковки товар считается непригодным для использования и подлежит утилизации.

Срок годности для использования и хранения изделий.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Определенных условий не требуется, изделия могут утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №



Handwritten signature and date: 19.01.2011