


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Самарский центр инвестиционных

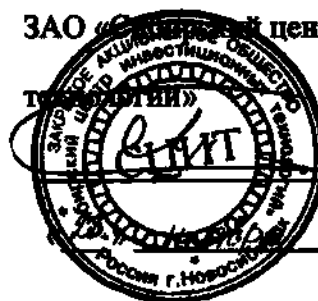

Келин Л.В.

2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению:

Салфетка сорбционная стерильная нейтральная ТУ9393-002-70530484-2013

I Салфетка сорбционная стерильная нейтральная, следующих типоразмеров:

- 10,0 см x 15,0 см;
- 10,0 см x 25,0 см;
- 15,0 см x 30,0 см;
- 20,0 см x 35,0 см.

1. Салфетка сорбционная стерильная нейтральная

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетка сорбционная стерильная нейтральная предназначена для терапии ран во влажной среде при трофических и диабетических язвах, пролежнях и других плохо заживающих ранах различного происхождения, при ранах с обильной экссудацией. Сорбционная основа салфетки впитывает экссудат и удерживает его внутри.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- для терапии ран во влажной среде, при трофических и диабетических язвах, пролежнях и других плохо заживающих ранах различного происхождения.
- при ранах с обильной экссудацией.

Салфетка сорбционная стерильная нейтральная является одноразовой.

Комплектность.

В комплект поставки входят:

- Салфетки одного исполнения и размера в индивидуальных упаковках, укомплектованные в количестве 20 шт. в групповую упаковку – 1 упаковка.

- Этикетка.

3. СОСТАВ

Сорбционная стерильная салфетка нейтральная состоит из пяти слоев:

- первый и пятый слой: гидрофильный нетканый материал плотностью 17 г/м²;
- второй и четвертый слой: гидрофильный нетканый материал плотностью 180 г/м²;
- третий слой (внутренний): SAP (суперабсорбирующий полимер).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер (см)	10x15	10x25	15x30	20x35
Средневзвешенная масса (г)	5,3	5,5	9,6	15,4
Сорбционная способность (г/г)	60	100	200	300
Время впитывания (сек)	1-2	1-2	1-2	1-2
Стерильность	ЕО	ЕО	ЕО	ЕО

Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
------	-------	-------	-------	-------

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Покраснения, зуд

7. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Проверьте целостность упаковки, срок годности.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Обработайте рану и прилегающий к ней участок кожи физиологическим раствором.
2. При предварительном использовании антисептических средств, обработайте рану физиологическим раствором.
3. Рана и прилегающий к ней участок кожи должны быть сухими.
4. Достаньте салфетку из стерильной упаковки.
5. Наложите салфетку на рану.
6. Зафиксируйте салфетку бинтом или лейкопластырем.
7. Смену салфетки необходимо проводить в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, вдали от агрессивных веществ (кислот, щелочей, растворителей и т.д.).

Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажностью воздуха 50-70%.

По истечении срока годности или при нарушении целостности упаковки товар становится непригодным для использования и подлежит утилизации.

Гарантийный срок хранения – распространяется на весь срок хранения салфеток (5 лет) при соблюдении условий хранения и транспортирования.

10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Определенных условий не требуется, изделия могут утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Лечение инфицированных ран должно осуществляться под руководством врача.

Избегать контакта с электродами или токопроводящими гелями при проведении

электронных измерений, например, ЭЭГ и ЭКГ.

Не использовать для лечения пациентов, проходящих магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Не используйте салфетку, если стерильная упаковка повреждена.

По всем вопросам потребитель может обращаться по адресу:

Закрытое акционерное общество «Сибирский центр инвестиционных технологий»
(ЗАО «СЦИТ»), Россия, 630051, г.Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 87, корп.2
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, Красный проспект, 153Б оф.32,
тел.: (383) 220-84-77, 220-87-91; e-mail- scit54@mail.ru

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
4 листа (ов)



Л.В.