

**Справка
об изделии медицинского назначения
салфетки марлевые медицинские**

Салфетки марлевые медицинские представляют собой куски нарезанной марли согласно ГОСТ 16427-93, сложенные и скомплектованные одного размера определенного количества изделий. Салфетки выпускаются в двух видах стерильные и нестерильные.

Размеры и комплектность марлевых салфеток

Наименование изделия	Количество изделий в комплекте, шт	
	стерильные	нестерильные
Салфетки 70 X 68 см (однослойные)	5	50
45 X 29 см (однослойные)	10	100
45 X 29 см (двухслойные)	5	50
16 X 14 см (однослойные)	20 или 40	100 или 200
16 X 14 см (двухслойные)	10 или 20	50 или 100
16 X 14 см (четырёхслойные)	5 или 10	25 или 50
16 X 8 см (четырёхслойные)	-	50

Принцип действия основан на высокой гигроскопичности и быстрой впитываемости раневого отделяемого и крови.

Материалы, используемые в производстве марлевых салфеток – это высококачественная марля, изготовленная по ГОСТ 9412, отбеленная без применения хлора плотного прядения.

Раскрой салфеток должен быть произведен по утку, кромки не отрезают и швы в салфетках не допускаются. При складывании салфеток их продольные и поперечные края должны быть загнуты вовнутрь так, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны

Для упаковки стерильных салфеток применяют пергамент марки Б ГОСТ 1341 и подпергамент ГОСТ 1760.

Для упаковки нестерильных салфеток применяется пленка полиэтиленовая толщиной не менее 0,05 по ГОСТ 10354. Транспортировка и хранение по ГОСТ 7000.

Сферы применения салфеток марлевых медицинских стерильных:

1. Первая помощь в экстренных ситуациях.
2. Помощь в обработке ран в полевых условиях.
3. Применение в ожоговых центрах.
4. Применение в хирургическом и гнойном отделении в поликлиниках и больницах.

Сферы применения салфеток марлевых медицинских нестерильных:

1. После автоклавирования в больничных условиях для наложения

Директор



Справка **об изделии медицинского назначения** **салфетки марлевые медицинские**

Салфетки марлевые медицинские представляют собой куски нарезанной марли согласно ГОСТ 16427-93, сложенные и скомплектованные одного размера определенного количества изделий. Салфетки выпускаются в двух видах стерильные и нестерильные.

Размеры и комплектность марлевых салфеток

Наименование изделия	Количество изделий в комплекте, шт	
	стерильные	нестерильные
Салфетки 70 X 68 см (однослойные)	5	50
45 X 29 см (однослойные)	10	100
45 X 29 см (двухслойные)	5	50
16 X 14 см (однослойные)	20 или 40	100 или 200
16 X 14 см (двухслойные)	10 или 20	50 или 100
16 X 14 см (четырёхслойные)	5 или 10	25 или 50
16 X 8 см (четырёхслойные)	-	50

Принцип действия основан на высокой гигроскопичности и быстрой впитываемости раневого отделяемого и крови.

Материалы, используемые в производстве марлевых салфеток – это высококачественная марля, изготовленная по ГОСТ 9412, отбеленная без применения хлора плотного плетения.

Раскрой салфеток должен быть произведен по утку, кромки не отрезают и швы в салфетках не допускаются. При складывании салфеток их продольные и поперечные края должны быть загнуты вовнутрь так, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.

Для упаковки стерильных салфеток применяют пергамент марки Б ГОСТ 1341 и подпергамент ГОСТ 1760.

Для упаковки нестерильных салфеток применяется пленка полиэтиленовая толщиной не менее 0,05 по ГОСТ 10354. Транспортировка и хранение по ГОСТ 7000.

Сферы применения салфеток марлевых медицинских стерильных:

1. Первая помощь в экстренных ситуациях.
2. Помощь в обработке ран в полевых условиях.
3. Применение в ожоговых центрах.
4. Применение в хирургическом и гнойном отделении в поликлиниках и больницах.

Сферы применения салфеток марлевых медицинских нестерильных:

1. После автоклавирования в больничных условиях для наложения.

Директор

М.Е.Бородин

