

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Интерторг»

Наумов М.С.



**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные
Basic латексные и нитриловые**

по ТУ 22.19.60-001-09831010-2022

**Руководство по эксплуатации
версия 2024.03**

Оглавление

1. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	4
1.1 Наименование изделия	4
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные и нитриловые	4
1.2 Назначение изделия	4
1.3 Показания к применению	4
1.4 Противопоказания к применению	5
1.5 Побочные действия.....	5
1.6 Общие сведения о медицинском изделии	5
1.7 Схема процесса производства перчаток	7
1.8 Варианты исполнения изделия	7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ.....	11
2.1 Технические характеристики медицинского изделия	11
3. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	23
3.1 Правила эксплуатации изделия	23
3.2 Условия и указания по эксплуатации	25
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	25
5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	25
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	26
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ.....	26
8. СРОК СЛУЖБЫ/ГОДНОСТИ	26
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	26
10. СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	26
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	27

Прежде чем приступить к использованию перчаток, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации.
Вы получите важные указания по применению изделия, которые позволят Вам правил распорядиться ими.

Обратите внимание на символы

	ИНФОРМАЦИЯ
	Обозначает важную информацию

1. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные и нитриловые

Производитель: ООО «Интерторг», 600006, Владимирская область, г.о. город Владимир, ул. Столето-вых, д. 9, этаж мансарда, помещ. 18

Место производства: Россия, 601241, Владимирская область, м.р-н Собинский, г.п. город Лакинск, г. Лакинск, пер Почтовый, зд. 3а/5

1.2 Назначение изделия

Перчатки медицинские диагностические одноразовые предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения.

Класс изделия в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий - 1.

1.3 Показания к применению

Перчатки необходимо применять при диагностическом осмотре, терапевтических процедурах, медицинских исследованиях, требующих соблюдения требований по защите пациента/медицинского работника от перекрестной инфекции.

При выборе конкретного варианта исполнения перчаток для максимально комфортного использования изделия рекомендуется учитывать следующие факторы:

- материалы, из которых изготовлены перчатки (латексные или нитриловые);
- функциональность и наличие текстуры (микротекстурированная, либо микротекстурированная на пальцах, либо гладкая);
- покрытие и обработка внешней и внутренней поверхности (опудренные или неопудренные);
- размер;
- цвет;
- комфорт (манжета с валиком, удлиненная манжета).

1.4 Противопоказания к применению

Не следует использовать данные медицинские перчатки людям, склонным к аллергии на химические вещества.

Индивидуальная непереносимость (повышенная чувствительность к компонентам изделия).

1.5 Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты, используемые в производстве перчаток. Также появление кожных раздражений как следствие неправильного ухода за кожей рук и жестких условий изоляции кожи рук от естественной вентиляции воздухом.

1.6 Общие сведения о медицинском изделии

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные и нитриловые – это изделия, предназначенные для медицинских целей в качестве мероприятий, обследований.

Диагностические перчатки из натурального латекса изготавливаются из латекса натурального каучука особой формулы для достижения высокой чувствительности и эластичности. Прочность и эластичность этих перчаток обеспечивают высокий уровень безопасности при длительном ношении.

Эластичный нитрил соответствует форме руки, создают дополнительное ощущение комфорта, сохраняют высокую тактильную чувствительность, обеспечивают надежную защиту. Также придает защиту и исключает риск аллергии, чувствительных к латексу. Данное изделие имеет удлиненную манжетку повышенной прочности и применяется при оказании манипуляций, особенно устойчивы к проколам. Текстурированная поверхность создаёт безопасность во время использования.

Перчатки подходят для обеих рук, доступны в пяти размерах (XS, S, M, L и XL). Поставка перчаток происходит в картонной коробке с перфорированным отверстием, которое без затруднений позволяет извлекать перчатки. Доступная цветовая гамма: от белого до жёлтого, синий, красный, зеленый, голубой, сиреневый, розовый, серый, черный

Наружная поверхность: микротекстурированная, либо микротекстурированная на пальцах, либо гладкая.


Микротекстурированная поверхность перчаток в местах захвата позволяет надежно и прочно удерживать инструмент при оптимальной чувствительности.

Перчатки с гладкой наружной поверхностью наиболее тонкие и не подходят для контакта с острым инструментарием. Их можно использовать при уходе за больными, а также для взятия анализов.

Внутренняя поверхность без опудривания:

Поверхность без опудривания идеально подходит для людей, чувствительно реагирующих на компоненты пудры. Для облегчения надевания и снижения воздействия протеинов латекса на кожу, на внутреннюю поверхность наносят полимерное покрытие или проводится хлоринация (одинарная или двойная). Так же хлоринация препятствует слипанию стенок изделия.

1.7 Схема процесса производства перчаток

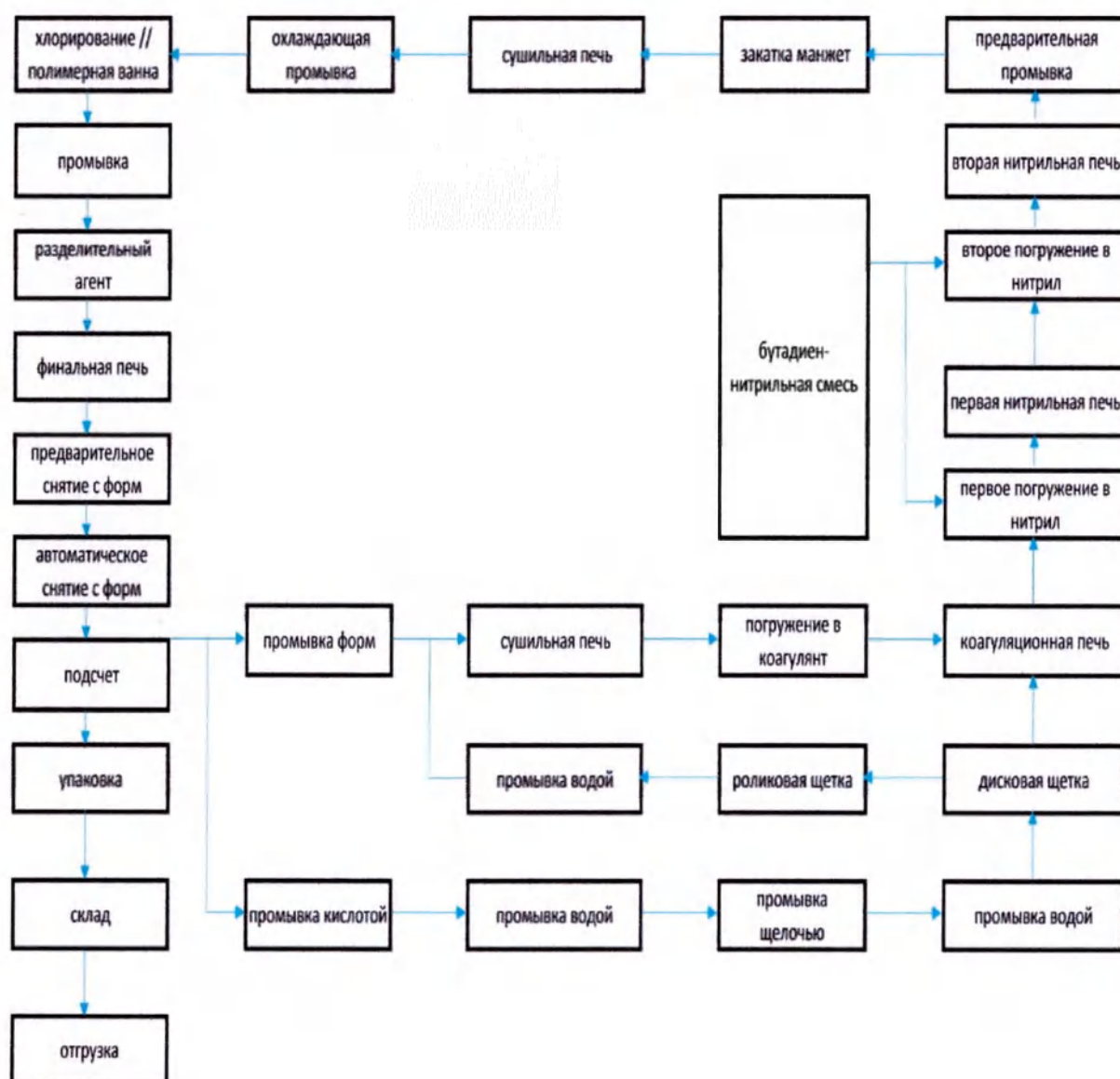

1.8 Варианты исполнения изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные латексные:

1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Daisy, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122560)

2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые

нестерильные Basic латексные опудренные Latex PP Chamomile, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122560)

3. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные на пальцах опудренные Latex PP Linum, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122560)

4. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Cornflower, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122560)

5. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Clover, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122560)

6. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Violet, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122560)

7. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные Latex PF Esthetics, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

8. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные хлорированные Latex PF Ultra, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

9. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Soft, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

10. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Flexible, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

11. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Sensitive, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

12. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные хлорированные Latex PF Ideal, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

13. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные 2-хкратно хлорированные Latex PF Polychloride, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: натуральный (без красителя), по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

14. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные 2-хкратно хлорированные Latex PF Force, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: синий по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

15. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Stability, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: синий по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

16. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Resistance, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: синий по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

17. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные хлорированные Latex PF

High-Risk, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: синий по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 122540)

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные нитриловые

Варианты исполнения:

18. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Nitrile PF Esthetics, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

19. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Ultra, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый, черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

20. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Soft, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

21. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные полимерным покрытием Nitrile PF Flexible, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

22. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные полимерным покрытием Nitrile PF Sensitive, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

23. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые

нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Ideal, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

24. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Delicate, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: красный / желтый / зеленый / сиреневый / голубой / розовый / серый / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

25. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Generous, размер: XS / S / M / L / XL, цвет: белый / голубой / синий / черный по 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке. (Вид 185830)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

2.1 Технические характеристики медицинского изделия

Таблица 1 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Daisy

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	4,1±0,3	4,3±0,3	4,5±0,3	4,7±0,3	4,8±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,08±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Гладкая				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 2 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные опудренные Latex PP Chamomile

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	4,7±0,3	4,8±0,3	5,0±0,3	5,2±0,3	5,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,08±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Гладкая				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 3 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные на пальцах опудренные Latex PP Linum

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	4,7±0,3	4,8±0,3	5,0±0,3	5,2±0,3	5,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Текстурированные на пальцах				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 4 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые

нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Cornflower

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	5,1±0,3	5,3±0,3	5,5±0,3	5,7±0,3	5,9±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,08±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Гладкая				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 5 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Clover

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	5,6±0,3	5,8±0,3	6,0±0,3	6,2±0,3	6,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,08 ±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Гладкая				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 6 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные гладкие опудренные Latex PP Violet

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10

Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	6,1±0,3	6,3±0,3	6,5±0,3	6,7±0,3	6,9±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,08±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Гладкая				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 7 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные Latex PF Esthetics

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	4,1±0,3	4,3±0,3	4,5±0,3	4,7±0,3	4,8±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 8 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные хлорированные Latex PF Ultra

Характеристики	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	4,6±0,3	4,8±0,3	5,0±0,3	5,2±0,3	5,5±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				

Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02
Поверхность	Текстурированные
Цвет	Натуральный (без красителя)
Форма	Неанатомическая
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0

Таблица 9 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Soft

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	4,6±0,3	4,8±0,3	5,0±0,3	5,2±0,3	5,5±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 10 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Flexible

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	5,1±0,3	5,3±0,3	5,5±0,3	5,7±0,3	5,9±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02				
Поверхность	Текстурированные				

Цвет	Натуральный (без красителя)
Форма	Неанатомическая
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0

Таблица 11 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Sensitive

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	5,6±0,3	5,8±0,3	6,0±0,3	6,2±0,3	6,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 12 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные, хлорированные Latex PF Ideal

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	5,6±0,3	5,8±0,3	6,0±0,3	6,2±0,3	6,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				

Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0

Таблица 13 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные 2-хкратно хлорированные Latex PF Polychloride

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±5	85±5	100±5	≥110
Вес, г	5,6±0,3	5,8±0,3	6,0±0,3	6,2±0,3	6,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,11±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Натуральный (без красителя)				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0				

Таблица 14 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные 2-хкратно хлорированные Latex PF Force

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	300±10	300±10	300±10	300±10	300±10
Ширина ладони, мм	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110
Вес, г	12,0±0,3	12,5±0,3	13±0,3	13,5±0,3	14,0±0,3
Толщина 1-ой стенки, мм на пальцах	0,22±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм на ладони	0,20±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм, манжета	0,13±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Синий				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				

Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	9
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6

Таблица 15 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Stability

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	300±10	300±10	300±10	300±10	300±10
Ширина ладони, мм	<80	80±10	95±10	110±10	≥110
Вес, г	14,5±0,3	15,0±0,3	15,5±0,3	16,0±0,3	16,5±0,3
Толщина 1-ой стенки, мм на пальцах	0,30±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм на ладони	0,25±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм, манжета	0,14±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Синий				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	9				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6				

Таблица 16 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Latex PF Resistance

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	300±10	300±10	300±10	300±10	300±10
Ширина ладони, мм	<80	80±10	95±10	110±10	≥110
Вес, г	12,0±0,3	12,5±0,3	13±0,3	13,5±0,3	14,0±0,3
Толщина 1-ой стенки, мм на пальцах	0,22±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм на ладони	0,20±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм, манжета	0,13±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Синий				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	9				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				

Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6
--	---

Таблица 17 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic латексные текстурированные неопудренные хлорированные Latex PF High-Risk

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	300±10	300±10	300±10	300±10	300±10
Ширина ладони, мм	<80	80±10	95±10	110±10	≥110
Вес, г	14,5±0,3	15,0±0,3	15,5±0,3	16,0±0,3	16,5±0,3
Толщина 1-ой стенки, мм на пальцах	0,30±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм на ладони	0,25±0,02				
Толщина 1-ой стенки, мм, манжета	0,14±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Синий				
Форма	Неанатомическая				
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650				
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	9				
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500				
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6				

Таблица 18 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные с полимерным покрытием Nitrile PF Esthetics

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	2,6±0,3	2,8±0,3	3,0±0,3	3,2±0,3	3,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, голубой, сиреневый розовый, серый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 19 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Ultra

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	2,6±0,3	2,8±0,3	3,0±0,3	3,2±0,3	3,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, голубой, розовый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 20 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Soft

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	2,8±0,3	3,0±0,3	3,2±0,3	3,4±0,3	3,6±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, сиреневый, голубой, розовый, серый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 21 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные полимерным покрытием Nitrile PF Flexible

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	2,8±0,3	3,0±0,3	3,2±0,3	3,4±0,3	3,6±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,03				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,03				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, сиреневый, голубой, розовый, серый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 22 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные полимерным покрытием Nitrile PF Sensitive

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	3,2±0,3	3,3±0,3	3,5±0,3	3,7±0,3	3,9±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, сиреневый, голубой, розовый, серый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 23 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Ideal

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	3,2±0,3	3,3±0,3	3,5±0,3	3,7±0,3	3,9±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,03				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,03				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, сиреневый, голубой, розовый, серый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 24 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Delicate

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	240±10	240±10	240±10	240±10	240±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	3,6±0,3	3,8±0,3	4,0 ±0,3	4,2±0,3	4,4±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,11±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,08±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Красный, желтый, зеленый, сиреневый голубой, розовый, серый, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

Таблица 25 – Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные Basic нитриловые текстурированные неопудренные хлорированные Nitrile PF Generous

Характеристика	Размер				
	XS	S	M	L	XL
Длина, мм	290±10	290±10	290±10	290±10	290±10
Ширина ладони, мм	70±10	80±10	95±10	110±10	120±10
Вес, г	6,1±0,3	6,3±0,3	6,5 ±0,3	6,8±0,3	7.0±0,3
Толщина 1-ой стенки на пальце, мм, не менее	0,16±0,02				
Толщина 1-ой стенки на ладони, мм, не менее	0,09±0,02				
Поверхность	Текстурированные				
Цвет	Белый, голубой, синий, черный				
Форма	Неанатомическая				
Относительное удлинение до ускоренного старения, %, не менее	500				
Условная прочность до ускоренного старения, МПа, не менее	14				
Относительное удлинение после ускоренного старения, %, не менее	400				
Условная прочность после ускоренного старения, МПа, не менее	14				

3. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Правила эксплуатации изделия

Перчатки медицинские диагностические одноразовые, имеют неанатомическую форму, подходят на обе руки.

Недопустимо использование при нарушении целостности перчаток.

При частом и длительном ношении рекомендуется соответствующий уход за кожей рук.


При появлении раздражений прекратить использовать перчатки и обратиться за консультацией к врачу.

Надевание перчаток (Рис. 1):

1. Всегда мойте руки перед надеванием перчаток или их заменой на новые перчатки.
2. Извлеките перчатки из оригинальной коробки.
3. Выберите перчатки с учетом процедуры и размера ваших рук. Ознакомьтесь с информацией до использования перчаток.
4. Прикасаться можно только к определенной части перчаток, соответствующей запястью (верхняя кромка манжеты).

5. Наденьте первую перчатку, вставив руку в отверстие и слегка потянув перчатку на себя второй рукой.
6. Возьмите вторую перчатку голой рукой. Прикасаться можно только к определенной части, соответствующей запястью.
7. Во избежание прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья вывернуть наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, что позволит надеть вторую перчатку.

Рис. 1

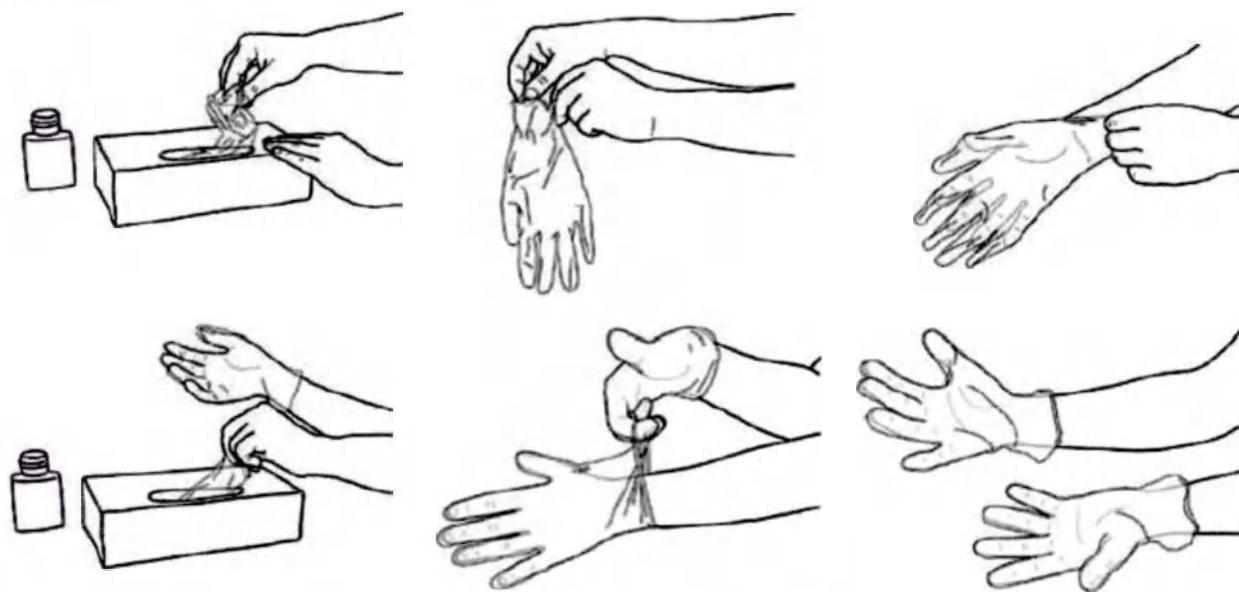

После того, как обе перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.

Меняйте перчатки до начала выполнения новой процедуры, чтобы избежать перекрестного заражения.


Снятие перчаток (Рис. 2):

1. Захватить пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не дотрагиваясь до кожи предплечья, и стягивать ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.
2. Держа снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подвести пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложить в первую перчатку.



Если все сделать правильно, в руках пользователя будет находиться комок вывернутых наизнанку перчаток, вставленных одна в другую, при этом загрязненная поверхность обеих перчаток будет находиться внутри комка.

Рис. 2

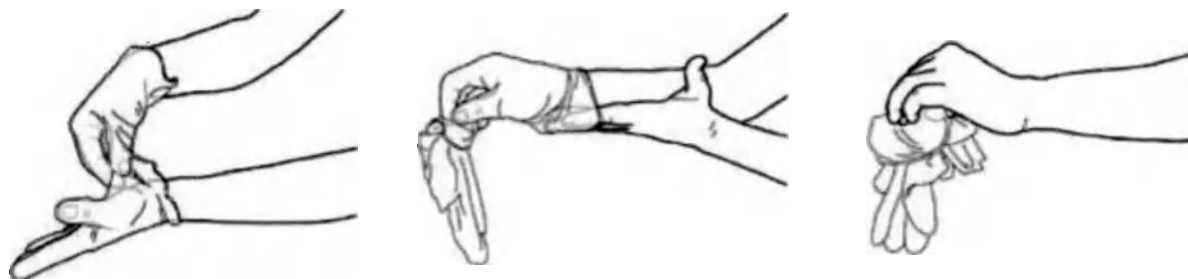

Утилизировать снятые перчатки.

Выполнить гигиену рук путем гигиенической антисептики или мытья с мылом.

3.2 Условия и указания по эксплуатации

Перчатки могут применяться в медицинских учреждениях широкого профиля, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С, относительной влажности окружающего воздуха до 85 % при 25 °С, атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).

Область медицинского применения перчаток – широкого применения. Работа с перчатками должна проводиться после предварительного ознакомления с инструкцией по применению.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки перчаток должны входить:

- перчатки – 10 / 20 / 40 / 100 / 200 / 1000 / 2000 штук в потребительской упаковке;
- инструкция по применению – 1 шт. в транспортной упаковке.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Перчатки должны храниться и транспортироваться упакованными в транспортную упаковку.

Хранение перчаток должно производиться в сухом проветриваемом помещении в упакованном виде. Избегать воздействия горюче-смазочных материалов и растворителей, озона, прямых солнечных лучей и флуоресцентного освещения. Не подвергать нагреванию и воздействию влаги.

Транспортирование перчаток должно производиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолетов и т. д.) в соответствии с правилами

перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, с обеспечением предохранения от механических повреждений, атмосферных осадков и перепадов температур при погрузочно-разгрузочных работах, при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С, относительной влажности окружающего воздуха до 85 % при 25 °С, атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Перчатки ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ

Уничтожение и утилизация перчаток – в соответствии с требованиями главы X СанПиН 2.1.3684.

8. СРОК СЛУЖБЫ/ГОДНОСТИ

Срок годности 5 лет с даты производства.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие перчаток показателям качества при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями и инструкцией по применению.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования и хранения в оригинальной упаковке изготовителя).

Не рекомендуется использовать перчатки по истечении срока годности. Дата истечения срока годности указана на потребительской упаковке.

Изготовитель не несет ответственности в случае неправильного использования изделий.

10. СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ООО «ИнтерТорг»

Юридический адрес: ООО «Интерторг» , 600006, Владимирская область, г.о. город Владимир, ул. Столетовых, д. 9, этаж мансарда, помещ. 18

Адрес места производства: Россия, 601241, Владимирская область, м.р-н Собинский, г.п. город Лакинск, г. Лакинск, пер. Почтовый, зд. 3а/5

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 9142	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 14192	Настоящий стандарт устанавливает общие правила маркировки грузов, в том числе поставляемых на экспорт, и предназначен для разработки нормативных документов на продукцию конкретных видов.
ГОСТ Р ИСО 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 32096	Картон тароупаковочный для пищевой продукции. Общие технические условия
ГОСТ 32337	Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования
ГОСТ 33070	Перчатки медицинские. Методы определения остаточного опудривающего вещества
ГОСТ ISO 10993-1	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-5	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
ГОСТ Р 50444	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р 52239	Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора
ГОСТ Р 52770	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р 52901	Картон, гофрированный для упаковки продукции. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 2859-1	Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по

	альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества
ГОСТ Р ИСО 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. основные требования

Генеральный директор

ООО «Интерторг»



Наумов М.С.

Подписано и пронумеровано (28) двадцать восемь листа(ов)

Генеральный директор ООО «ИнтерТорг»

Наумов М.С.

