

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОРТОМЕД»**

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ОРТОМЕД»

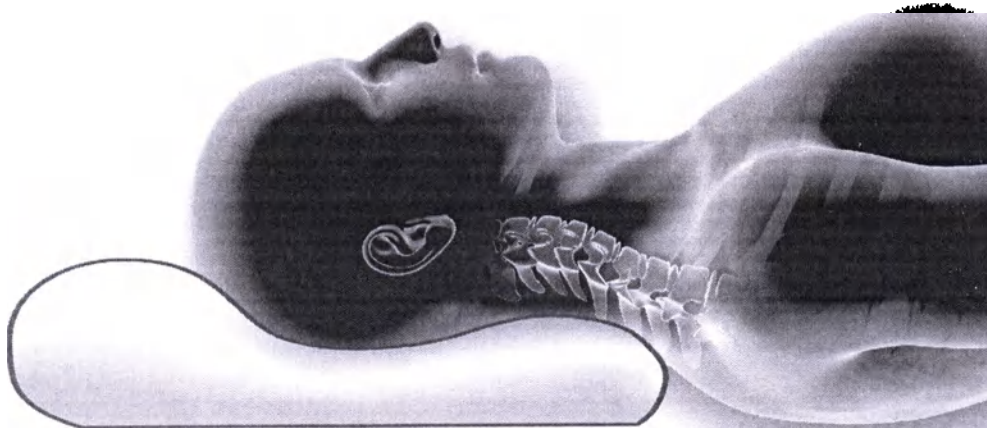
Корниенко Д.А.

« 01 » ноября 2022 г.

**ПОДУШКИ «ORTOCORRECT» С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ
ФОРМОВАННОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕДИЦИНСКИЕ
ПО ТУ 32.50.22-001-12135107-2018**

Руководство по эксплуатации

9398.001.12135107 РЭ



Ростовская область,
г. Таганрог,
2022 г.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции, изготовленной нашим предприятием!

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации», проверить целостность упаковки и самих изделий, и обеспечить их применение в соответствии с целевым назначением и установленными требованиями.

Наименование изготовителя: ООО «ОРТОМЕД»

**Адрес: 347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Котлостроительная 37-26, офис 1.**

**Тел.: +7 (800) 301-25-13,
эл. почта: ortomed1@mail.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	4
2. Назначение и область применения.....	4
3. Состав и описание продукции.....	6
4. Комплектность.....	15
5. Маркировка.....	22
6. Упаковка.....	24
7. Применяемые сырье и материалы.....	25
8. Основные меры безопасности.....	32
9. Указания по эксплуатации.....	33
10. Уход за изделием.....	40
11. Транспортирование и хранение.....	41
12. Утилизация.....	41
13. Гарантийные обязательства.....	42
14. Сведения о рекламации.....	42

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит техническое описание медицинского изделия «Подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана медицинские по ТУ 32.50.22-001-12135107-2018», в вариантах исполнения (далее по тексту – Подушки); правила и указания для их правильного применения и другие сведения, которые необходимо знать потребителю.

1.2 Настоящее Руководство распространяется на все модели и типоразмеры Подушек, выпускаемых по ТУ 32.50.22-001-12135107-2018.

1.3 Подушки изготавливаются в соответствии с нормами ГОСТ Р 15.013-2016, ГОСТ Р 57769- 2021, ГОСТ Р 50444 -2020 и «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 г. № 299 (глава II, раздел 18).

1.4 Термины и определения – по ГОСТ 17037-85 и ГОСТ 31508-2012.

1.5 Настоящее Руководство по эксплуатации выполнено с учётом указаний ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019.

Сертификат (декларация) соответствия №, срок действия с по, выдан(а) органом

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана (ППУ) медицинские (далее – подушки) используются в качестве ортопедических средств, обеспечивающих физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии. Применение подушек предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Подушки состоят из основы (наполнителя) и несъемной наволочки (наперника) определенной формы. Также к подушкам прилагаются съемные наволочки.

Для вариантов исполнения «Подушка Termogel XL Plus - 58x38x12/14» и «Подушка Termogel L - 58x38x12/10» в состав входит гелевая вставка (несъемная).

Подушки Termogel имеют вставку с гелем, который наносится на поверхность наполнителя из пенополиуретана с анатомической формой. Гелевая вставка имеет прямоугольную форму и структурную поверхность - выпуклые ячейки квадратной формы.

Для вариантов исполнения «Подушка Lavanda Classic M», «Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit» и «Подушка BeautyLux» в состав входит вкладыш для регулировки высоты.

Вкладыш для подушек Подушка Lavanda Classic M и Подушка BeautyLux. В комплекте имеется вкладыш для регулировки высоты подушки, который можно использовать по необходимости (он легко как вставляется, так и вынимается из съемной наволочки).

Изготовлен вкладыш из пенополиуретан высокой плотности. Благодаря ему можно отрегулировать наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии.

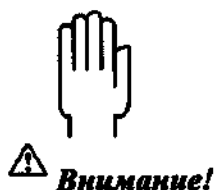
Вкладыш для подушки Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit. Подушка применяется, чтобы вырез был со стороны копчика. Благодаря своей наклонной форме, подушка-квадрат помогает подавать таз вперед, формируя при этом физиологически правильное положение.

Подушка состоит из двух слоев, верхний - из пенополиуретана с "эффектом памяти", которая способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Подушки BabySleep рассчитаны на возраст от 1 месяцев до 1,5 лет.

Подушки Classic XS рассчитаны на возраст от 1,5 до 3 лет.

2.2 Подушки применяются в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.



Любое другое использование Подушек считается их использованием не по назначению!

2.3 Подушки в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования относятся к классу Г по ГОСТ Р 50444 -2020.

2.4 Класс потенциального риска применения медицинского изделия - 1 по ГОСТ 31508-2012 и Приказу МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г. (с изменениями от 25.09.2014 г.), вид – неинвазивное, длительного применения.

2.5 Подушки пригодны для применения в условиях УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С.

Относительная влажность – не более 80% при плюс 25 °С.

2.6 Условия эксплуатации в части стойкости ко внешним механическим воздействиям – по группе 2 ГОСТ Р 50444 -2020.

2.7 Типы, модели и конструктивное исполнение Подушек соответствуют предусмотренным конструкторской документацией и отвечают эксплуатационным требованиям согласно целевому назначению.

2.8 Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение во время сна или дневного отдыха.
- Профилактика возникновения головных болей при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.
- Профилактика развития остеохондроза шейного отдела позвоночника.
- Комплексная терапия остеохондроза шейного отдела позвоночника.
- Устранение мышечного дисбаланса в области шеи и надплечий.
- Улучшение кровоснабжения.
- Комплексная реабилитация травм.
- Снижение болей при геморрое (только для подушек: под сиденье круглой и под сиденье квадратной);
- Восстановление после хирургии, во время и после беременности.

2.9 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала;
- воспалительные заболевания кожи.

2.10. Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящего руководства и показаний к применению.

2.11 Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте подушки только в соответствии с данным руководством.
- Уход за изделием осуществлять в соответствии с данным руководством.
- Не использовать изделие при нарушении целостности наперника.

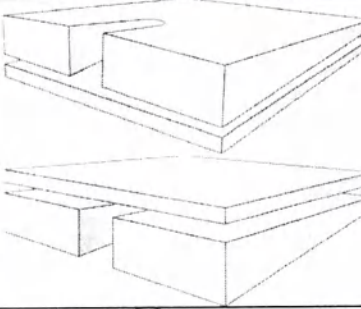
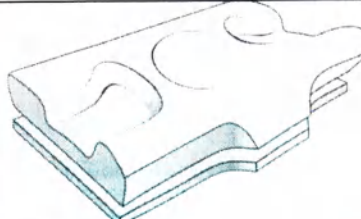
3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

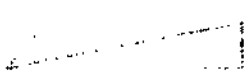
3.1 Подушки изготавливаются различных видов и моделей, с формой и размерами, представленными в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование (модель)	Общий вид	Размеры, см	Масса (с несъемной наволочкой), г
--------------------------	-----------	-------------	--------------------------------------

Подушка Classic		XXL - 54x34x14/16 XL Plus - 58x38x12/14 XL — 58x38x10/14 L - 58x38x12/10 M — 58x37x9/11 S - 49x29x9/7 XS - 39x24x7/5	2000
Подушка Premium 1 plus		54x34x10/14	1500
Подушка Premium 1		54x34x9/12	1500
Подушка Premium 2 plus		58x34x10/12	1500
Подушка BabySleep		23x21,5x3	400
Подушка Валик		Ø11x 27	350
Подушка Турист		27x27 высота 9/6	400
Подушка Кольцо для сидения OrtoSit		Ø 43/13 высота 7,5	500
Подушка под сиденье (квадратная)		39x39x6,5	900
Подушка Под спину OrtoBack		38,5x36 высота 9	1000

Подушка Classic Aloe Vera		XL — 58x38x10/14 L - 58x38x12/10	2000
Подушка Termogel		XL Plus — 58x38x12/14 L - 58x38x12/10	2000
Подушка Classic Simple M		M — 58x37x9/11	2000
Подушка Lavanda Classic M		M — 58x37x9/11 (11/13) доп. вкладыш с регулировкой высоты 55x30x2	2000
Подушка Comfort		60x40x13	2000
Подушка Ideal		58x32x11/6.5	1500
Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit		39x39x5/1 (7/3) доп. вкладыш с регулировкой высоты 39x39x2	500
Подушка Под ноги		44x64 12/8/9 (14/10/11) доп. вкладыш с регулировкой высоты 44x64x2	1100
Подушка BeautyLux		56x38x10/8,5 П-образная выемка 8/4,5/5	1800

Подушка Клиновидная		80x70x20	1400
Подушка Клиновидная- трансформер		80x70x21	1360

Допускаемые отклонения по габаритным размерам подушек: $\pm 2,0$ см.

Допускаемое отклонение по массе: $\pm 5\%$.

3.2 Габаритные размеры и масса съемных наволочек должны соответствовать таблице 3.2.

Таблица 3.2

Наименование (модель) подушки	Наименование (тип) Наволочки	Размеры, не более, см	Масса, не более, г
Подушка Classic	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	XXL - 60x40 XL Plus - 60x40 XL - 60x40 L - 60x40 M - 60x40 S - 50x30 XS - 40x25	30
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	XXL - 60x40 XL Plus - 60x40 XL - 60x40 L - 60x40 M - 60x40 S - 50x30 XS - 40x25	40
Подушка Premium 1 plus	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	55x35	30
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	55x35	40
Подушка Premium 1	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	55x35	30
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	55x35	40
Подушка Premium 2 plus	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	60x35	30
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	60x35	40
Подушка BabySleep	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	30x25	25
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	30x25	35
Подушка Валик	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	Ø13x30	40
		Ø13x30	40

	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани		
Подушка Кольцо для сидения OrtoSit	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	Ø46x16	40
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	Ø46x16	40
Подушка под сиденье (квадратная)	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	40x40	50
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	40x40	50
Подушка Под спину OrtoBack	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	40x37	50
	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	40x37	50
Подушка Турист	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	Ø30x75	20
	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	Ø30x75	20
Подушка Classic Aloe Vera	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	XL – 60x40 L – 60x40	30
	Наволочка из трикотажной полиэстеровой ткани	XL – 60x40 L – 60x40	40
Подушка Termogel	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	XL Plus - 60x40 L – 60x40	30
	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	XL Plus - 60x40 L – 60x40	40
Подушка Classic Simple M	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	M – 60x40	30
Подушка Lavanda Classic M	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	M – 60x40	30
	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	M – 60x40	40
Подушка Comfort	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	60x40	30
	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	60x40	40
Подушка Ideal	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	65x35	30
	Наволочка из трикотажной полиэстеровой ткани	65x35	40
Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	40x40	50
Подушка Под ноги	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	45x68	50

Подушка BeautyLux	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	60x40	50
	Наволочка из —трикотажной смесовой ткани	60x40	50
Подушка Клиновидная	Наволочка из Полиэстеровой ткани марки Поплекс	70x80x20	140
Подушка Клиновидная- трансформер	Наволочка из Полиэстеровой ткани марки Поплекс (часть 1)	70x60x5	100
	Наволочка из Полиэстеровой ткани марки Поплекс (часть 2)	70x80x14	180

Допускаемые отклонения по габаритным размерам наволочек $\pm 5,0$ см., в зависимости от видов, составов и индивидуальной усадке используемых тканей.

Основа (наполнитель) подушек должна изготавливаться из вязкоэластичного пенополиуретана методом теплого формования при реакции двух компонентов:

А - смесь простых полиэфиров, воды, пеностабилизаторов, катализаторов;

Б - дифенилметандиизоцианат

Несъемные наволочки для подушек исполнения Подушка Classic, Подушка Classic Simple M, Подушка Premium 1 plus, Подушка Premium 1, Подушка Premium 2 plus, Подушка Classic Aloe Vera, Подушка Termogel, Подушка Lavanda Classic M, Подушка Comfort, Подушка Ideal, BeautyLux должны изготавливаться из хлопчатобумажной ткани.

Несъемная наволочка для Подушки BabySleep должна изготавливаться из трикотажной смесовой ткани или трикотажной полиэстеровой ткани.

Несъемная наволочка для Подушки Турист должна изготавливаться из хлопчатобумажной ткани с застежкой-«молния» (при необходимости).

Несъемная наволочка для подушек исполнения Валик, Подушка Кольцо для сидения OrtoSit, Подушка под сиденье (квадратная), Подушка Под спину OrtoBack, Подушка Classic Simple M должна изготавливаться из хлопчатобумажной ткани(при необходимости).

К подушкам должны прилагаться съемные наволочки:

- к подушкам исполнения Подушка BabySleep – съемная наволочка из хлопчатобумажной ткани;

- к подушкам исполнения Classic, Premium 1 plus, Premium 1, Premium 2 plus, Подушка BabySleep, Валик, Подушка Кольцо для сидения OrtoSit, Подушка под сиденье (квадратная), Подушка Под спину OrtoBack, Подушка Турист, Подушка Termogel, Подушка Lavanda Classic M, Подушка Comfort, , Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit, Подушка Под ноги – съемные наволочки из трикотажной смесовой ткани или трикотажной

полиэстеровой ткани с застежкой-«молния».

- Подушка Classic Aloe Vera, Подушка Ideal - съемные наволочки из трикотажной полиэстеровой ткани с застежкой-«молния»;
- Подушка BeautyLux - съемные наволочки из трикотажной смесовой ткани с застежкой-«молния»);
- Подушка Клиновидная, Подушка Клиновидная-трансформер - съемные наволочки из полиэстеровой ткани марки Поплекс с застежкой-«молния».

Цветовые исполнения несъемных и съемных наволочек изделий должны быть:

- исполнение подушка Classic: XXL, XL Plus, XL, L, M, S, XS - несъемная наволочка цвет - серый меланж; съемная наволочка –молочный,
- исполнение подушка Premium 1 plus - несъемная наволочка, цвет серый меланж; съемная наволочка, цвет молочный,
- исполнение подушка Premium 1- несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка - молочный,
- исполнение подушка Premium 2 plus - несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка - молочный,
- исполнение Подушка BabySleep - несъемная наволочка- салатовый; съемная наволочка – цветной орнамент,
- исполнение подушка Валик - несъемная наволочка серый меланж, съемная наволочка - синий/серый,
- исполнение Подушка Турист - несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка - синий/серый,
- исполнение Подушка Кольцо для сидения OrtoSit - несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка - синий/серый,
- исполнение Подушка под сиденье (квадратная) - несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка - синий/серый,
- исполнение Подушка Под спину OrtoBack - несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка - синий/серый,
- исполнение подушка Classic Aloe Vera - несъемная наволочка цвет серый меланж; съемная наволочка - растительный орнамент,
- исполнение подушка Termogel - несъемная наволочка, цвет бирюза; съемная наволочка –молочный,
- исполнение подушка Classic Simple M - несъемная наволочка, цвет серый меланж,

- исполнение подушка Lavanda Classic M - несъемная наволочка цвет серый меланж; съемная наволочка, цвет лиловый,
- исполнение подушка Comfort - несъемная наволочка цвет серый меланж; съемная наволочка, цвет ярко- салатový, белый,
- исполнение подушка Ideal - несъемная наволочка, цвет серый меланж; съемная наволочка – цвет бирюза,
- исполнение подушка Квадрат с уклоном OrtoSit - съемная наволочка - цвет синий/серый,
- исполнение Подушка Под ноги - съемная наволочка, цвет синий/серый,
- исполнение подушка BeautyLux - несъемная наволочка, цвет серый меланж; съемная наволочка, цвет розово-бежевый.
- исполнение Подушка Клиновидная - съемная наволочка, цвет бежевый;
- исполнение Подушка Клиновидная-трансформер - съемная наволочка, цвет бежевый.

Застёжки-«молния» наволочек (если предусмотрены) должны обеспечивать прочное и плотное соединение.

Усилие размыкания застёжки-«молнии» должно быть в пределах 20-40 Н.

Технический проем на несъемной наволочке (напернике) должен быть зашит швом «на лицо», ширина шва от 0,4 до 0,6 мм.

Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества; допустимое отклонение строчек от края должно быть не более 2 мм.

Виды и параметры стежков, строчек и швов, применяемых при пошиве, а также их внешний вид должны соответствовать требованиям ГОСТ 12807.

Количество стежков на 5 см машинной строчки должно быть при пошиве не менее 12, при выстегивании изделий (8±1).

Нагрузка разрывная для швов изделий по длине 100 мм должна быть не менее 100 Н.

Строчка на подушках должна быть без искривлений, влияющих на внешний вид и прочность изделий, нить строчки должна быть хорошо натянута.

Нитки для страчивания и настрачивания должны быть в цвет или контрастные (в соответствии с моделью).

Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

Подушки должны быть без складок и сборок. Глубина складок должна быть не более 5 мм.

Части несъемных наволочек (наперников) подушек должны быть соединены стачным швом шириной 15±2 мм.

На поверхностях несъемных и съемных наволочек не допускаются инородные включения, надрывы, порезы, вздутия, дыры, проколы, прорубание машинной иглой, обрывы нитей в отделочных строчках и другие пороки.

Наполнитель подушек (основа) должен быть равномерно распределен.

Гигроскопичность на поверхности подушек должна быть не менее 6 %.

Воздухопроницаемость на поверхности подушек должна быть не менее $100 \text{ дм}^3 / \text{м}^2 \text{ с}$.

Пористость подушек должна быть не более 45%.

Физико-механические свойства материала подушек приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Наименование показателей	Норма для эластичного ППУ и вязко- эластичного ППУ
Разрушающее напряжение при растяжении, КПа	Не менее 70
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 100
Относительная остаточная деформация через 72 ч при температуре 20°C и 50%-ном сжатии, %, не более	Не более 5
Кажущаяся плотность, кг/м ³	12-60
Напряжение сжатия при 40%-ной деформации; КПа	2...4

Наружные поверхности подушек (несъемные наволочки) должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 - 3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина ТУ 6-01-4689387-89.

Съемные наволочки и несъемные наволочки должны быть устойчивы к многократной стирке машинным способом с применением порошков без отбеливателя при максимальной температуре 30 °С. Режимы полоскания и отжима должны быть обычные. Изменение линейных размеров после стирки должно быть не более 5 %.

Устойчивость окраски материалов верха и подкладки изделий должна быть не менее 3 баллов.

Подушки при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 -2020 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 - 69.

Подушки, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 -2020 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Подушки при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444 -2020.

Подушки, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, по устойчивости к

механическим воздействиям при транспортировании должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 -2020.

Средний срок службы подушек должен быть не менее 5 лет.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки подушек должен соответствовать таблице 4.

Таблица 4.1

№№	Наименование/тип	Обозначение документа или основные характеристики	Количество
1	Подушка Classic, варианты исполнения ¹ :	ФМТК.942519.-01	
	XXL - 54x34x14/16	ФМТК.942519.-01-06	1
	XL Plus - 58x38x12/14	ФМТК.942519.-01-07	1
	XL - 58x38x10/14	ФМТК.942519.-01-01	1
	L - 58x38x12/10	ФМТК.942519.-01-02	1
	M - 58x37x9/11	ФМТК.942519.-01-03	1
	S - 49x29x9/7	ФМТК.942519.-01-04	1
	XS - 39x24x7/5	ФМТК.942519.-01-05	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-01HX-06	1*
	XXL - 60x40	ФМТК.942519.-01HX-07	1*
	XL Plus - 60x40	ФМТК.942519.-01HX-01	1*
	XL - 60x40	ФМТК.942519.-01HX-02	1*
	L - 60x40	ФМТК.942519.-01HX-03	1*
	M - 60x40	ФМТК.942519.-01HX-04	1*
	S - 50x30	ФМТК.942519.-01HX-05	1*
	XS - 40x25		1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-01HC-06	1*
	XXL - 60x40	ФМТК.942519.-01HC-07	1*
	XL Plus - 60x40	ФМТК.942519.-01HC-01	1*
	XL - 60x40	ФМТК.942519.-01HC-02	1*
	L - 60x40	ФМТК.942519.-01HC-03	1*
	M - 60x40	ФМТК.942519.-01HC-04	1*
	S - 50x30	ФМТК.942519.-01HC-05	1*

	XS – 40x25		
	Индивидуальная упаковка (на каждую модель)	ФМТК.942519.-01ИУ	7
	Ярлык на подушку ² (на каждую модель)	ФМТК.942519.-01Я	7
	Этикетка на упаковку ³ (на каждую модель)	ФМТК.942519ЭТ	7
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт (на каждую модель)	939800.001.12135107ПС	7
2	Подушка Premium 1 plus	ФМТК.942519.-02-pl	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-02НХ-pl	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-02НХ-pl	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-02ИУ-pl	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-02Я-pl	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ-pl	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ-pl	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС-pl	1
3	Подушка Premium 1	ФМТК.942519.-02	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-02НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-02НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-02ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-02Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
4	Подушка Premium 2 plus	ФМТК.942519.-03	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-03НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-03НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-03ИУ	1

	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-03Я	1
	Этикетка на упаковку на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
5	Подушка BabySleep	ФМТК.942519.-04	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-04НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-04НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-04ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-04Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
6	Подушка Валик	ФМТК.942519.-05	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-05НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-05НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-05ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-05Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
7	Подушка Турист	ФМТК.942519.-06	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-06НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-06НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-06ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-06Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
8	Подушка Кольцо для сидения OrtoSit	ФМТК.942519.-07	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-07НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой	ФМТК.942519.-07НС	1*

	ткани/трикотажной полиэстеровой ткани		
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-07ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-07Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
9	Подушка под сиденье (квадратная)	ФМТК.942519.-08	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-08НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-08НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-08ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-08Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
10	Подушка Под спину OrtoBack	ФМТК.942519.-09	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-09НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-09НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-09ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-09Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
11	Подушка Classic Aloe Vera, варианты исполнения ¹ :	ФМТК.942519.-10	
	XL — 58x38x10/14	ФМТК.942519.-10-01	1
	L - 58x38x12/10	ФМТК.942519.-10-02	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани: XL – 60x40 L – 60x40	ФМТК.942519.-10НХ-01 ФМТК.942519.-10НХ-02	1* 1*
	Наволочка из трикотажной полиэстеровой ткани:	ФМТК.942519.-10НС-01	1*

	XL – 60x40 L – 60x40	ФМТК.942519.-10НС-02	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-10ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-10Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
12	Подушка Tетmogel, варианты исполнения ¹ :	ФМТК.942519.-11	
	XL Plus — 58x38x12/14	ФМТК.942519.-11-01	1
	L - 58x38x12/10	ФМТК.942519.-11-02	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани: XL Plus - 60x40 L – 60x40	ФМТК.942519.-11НХ-01 ФМТК.942519.-11НХ-02	1* 1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани: XL Plus - 60x40 L – 60x40	ФМТК.942519.-11НС-01 ФМТК.942519.-11НС-02	1* 1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-11ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-11Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
13	Подушка Classic Simple M	ФМТК.942519.-12	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-12НХ	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-12ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-12Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
14	Подушка Lavanda Classic M	ФМТК.942519.-13	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-13НХ	1*

	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-13НС	1*
	Вкладыш для регулировки высоты	ФМТК.942519.-13ВК	1
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-13ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-13Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
15	Подушка Comfort	ФМТК.942519.-14	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-14НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-14НС	2*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-14ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-14Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
16	Подушка Ideal	ФМТК.942519.-15	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-15НХ	1*
	Наволочка из трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-15НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-15ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-15Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
17	Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit	ФМТК.942519.-16	1
	Вкладыш для регулировки высоты	ФМТК.942519.-16ВК	1
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-16НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-16ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-16Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1

	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
18	Подушка Под ноги	ФМТК.942519.-17	1
	Вкладыш для регулировки высоты	ФМТК.942519.-17БК	1
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-17НС	1*
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-17ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-17Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
19	Подушка BeautyLux	ФМТК.942519.-18	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-18НХ	1*
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани	ФМТК.942519.-18НС	2*
	Вкладыш для регулировки высоты	ФМТК.942519.-18БК	1
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани на вкладыш для регулировки высоты	ФМТК.942519.-18ВКНХ	1
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-18ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-18Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
20	Подушка Клиновидная	ФМТК.942519.-19	1
	Наволочка из ткани полиэстеровая марка Поплекс	ФМТК.942519.-19НС	1
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-19ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-19Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1
21	Подушка Клиновидная -трансформер	ФМТК.942519.-20	1
	Наволочка из ткани полиэстеровая марка Поплекс (часть 1)	ФМТК.942519.-20НС-1	1
	Наволочка из из ткани полиэстеровая	ФМТК.942519.-20НС-2	1

	марка Поплекс (часть 2)		
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-20ИУ	1
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-20Я	1
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1

Примечания:

¹ Исполнение подушки определяется при заказе по согласованию с заказчиком.

² Ярлык пришивается на подушку.

³ Этикетка наклеивается на индивидуальную упаковку.

* Данная принадлежность может поставляться по согласованию с заказчиком.

5. МАРКИРОВКА

5.1 Маркировка подушек должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 -2020, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 30332 и настоящих ТУ.

5.2 Для маркировки изделия применяют товарный ярлык с нанесением символов по уходу.

5.3 Товарный ярлык должен быть пришит, навешен на изделие или прикреплен к нему способом, обеспечивающим сохранность ярлыка

5.4 На товарном ярлыке должны быть указаны следующие данные:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя и (или)
- товарный знак предприятия и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование изделия, артикул и ЛОТ;
- размер изделия;
- состав сырья основы (наполнителя);
- материал несъемной наволочки (наперника);
- материал съемной наволочки (при наличии);
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием - изготовителем;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- индивидуальный штрих код.

5.5 На ярлыке должны быть указаны символы по уходу за изделиями:



Изделие не должно подвергаться глажению;



Максимальная температура стирки 30°, обычный режим;



Не отбеливать;



Возможна барабанная сушка, обычная температура

5.6 Для маркировки изделий, упакованных в индивидуальную упаковку, наклеивают этикетку-уголок с указанием следующих реквизитов:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя и (или)
- товарный знак предприятия и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование изделия, артикул и ЛОТ;
- размер изделия;
- состав изделия;
- дата изготовления (месяц, год);
- правила утилизации согласно СанПиН 2.1.3684-21 (при необходимости);
- обозначение настоящих технических условий;
- условия хранения;
- условия по уходу за изделием;
- гарантийный срок эксплуатации;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- индивидуальный штрих код.

Реквизиты на этикетке должны быть нанесены типографским, печатным шрифтом.

5.7 Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя с указанием адреса предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение изделия;
- количество изделий в упаковке;
- условия хранения;
- условия транспортирования;
- год и месяц упаковывания.

На транспортную упаковку должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: “Верх”, “Беречь от влаги”.

Манипуляционные знаки должны наноситься по трафарету или штемпелеванием

черной водостойкой краской.

6. УПАКОВКА

6.1 Подушки упаковываются согласно ГОСТ 10581, ГОСТ Р 50576 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769).

В качестве потребительской упаковки могут использоваться полимерные пакеты - «Сумка упаковочная с ручкой и молнией». Материал: Марка ПВД 66х45+4/7, 000"Максима-НСК", г. Новосибирск Полиэтилен высокого давления 100%.

6.2 Подушки в потребительской упаковке могут укладываться в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 13514 или ГОСТ 9142.

Коробки оклеиваются липкой лентой по ГОСТ 18251 или обвязываются шпагатом по ГОСТ 17308. Масса коробок не должна превышать 50 кг.

6.3 Допускается упаковка подушек в мешки или кипы из упаковочной ткани по ГОСТ 5530, из нетканого полотна или мешочной ткани, внутри которых может быть проложена бумага по ГОСТ 2228 или другому нормативному документу.

Мешки и кипы зашивают хлопчатобумажными швейными нитками необходимой прочности, непрерывным швом без наращивания нитки. Шаг стежка, как правило – (5±1) см.

В мешки или кипы должна быть вложена потребительская тара для упаковывания каждой подушки при реализации. Масса мешка (кипы) должна быть не более 20 кг.

При отгрузке подушек в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

7 . ПРИМЕНЯЕМЫЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

7.1 Для изготовления основных элементов подушек и наволочек должно использоваться сырье и материалы согласно таблице 7.1.

Таблица 7.1

Наименование подушки	Наименование материала	Производитель, марка материала, красителя	Состав материала	Тип контакта
Подушка Classic XXL - 54х34х14/16; XL Plus -	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	А ВЭЛ 1004 НК Polyol, А ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека

58x38x12/14; XL - 58x38x10/14; L - 58x38x12/10; M - 58x37x9/11; S - 49x29x9/7; XS - 39x24x7/5				
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Premium 1 plus	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 HK Polyol, A ВЭЛ 1006 HK Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Premium 1	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 HK Polyol, A ВЭЛ 1006 HK Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Premium 2 plus	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 HK Polyol, A ВЭЛ 1006 HK Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка BabySleep	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 HK Polyol, A ВЭЛ 1006 HK Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека

	Наволочка из хлопчатобумажной ткани (съемная)	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)	Хлопок 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
	Несъемная наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)–	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Валик	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 HK Polyol, A ВЭЛ 1006 HK Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Кольцо для сидения OrtoSit	Наполнитель – пенополиуретан (пена "стандарт")	A SpecFlex 675	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка под сиденье (квадратная)	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 HK Polyol, A ВЭЛ 1006 HK Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Нет контакта с организмом человека
Подушка Под спину OrtoBack	Наполнитель – пенополиуретан (пена "стандарт") без эффекта памяти	A SpecFlex 675	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека

	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)–	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Турист	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	А ВЭЛ 1004 НК Polyol, А ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Classic Aloe Vera XL- 58x38x10/14; L - 58x38x12/10	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	А ВЭЛ 1004 НК Polyol, А ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Termogel XL Plus - 58x38x12/14; L - 58x38x12/10	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	А ВЭЛ 1004 НК Polyol, А ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Гелевая вставка (несъемная)	MDI, polyhydric alcohol	полиметиленифенилоксиона т 7.5%, многоатомный спирт 92.5%	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)–	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Classic Simple M	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	А ВЭЛ 1004 НК Polyol, А ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека

	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)–	Хлопок 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Lavanda Classic M	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 НК Polyol, A ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Вкладыш для регулировки высоты, наполнитель - пенополиуретан	EL 2240	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Comfort	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 НК Polyol, A ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	*ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Ideal	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 НК Polyol, A ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) –	полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit	Наполнитель –пенополиуретан, регулировка высоты	ST 2236	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека

	Вкладыш для регулировки высоты, наполнитель - пенополиуретан с эффектом памяти	VE 4515	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Под ноги	Наполнитель – пенополиуретан	ST 2236	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Вкладыш для регулировки высоты, наполнитель - пенополиуретан	VE 4515	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка BeautyLux	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	A ВЭЛ 1004 НК Polyol, A ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Вкладыш для регулировки высоты, наполнитель - пенополиуретан	EL 2240	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка на вкладыш для регулировки высоты хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани размер 1	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани размер 2	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой ткани размер 3	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан) -	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
Подушка Клиновидная	Наполнитель: пенополиуретан	ST 2236	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из ткани полиэстеровая марка Поплекс	Hebei Oak New Material Co., Ltd. (Китай) -	100% полиэстер	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей

Подушка Клиновидная-трансформер	Наполнитель пенополиуретан	ST 2236, VE 4515 (с эф. памяти)	Пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из ткани полиэстеровая марка Поплекс часть 1	Hebei Oak New Material Co., Ltd. (Китай)	100% полиэстер	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей
	Наволочка (съемная) из ткани полиэстеровая марка Поплекс часть 2	Hebei Oak New Material Co., Ltd. (Китай)	100% полиэстер	Продолжительный контакт с неповрежденной кожей

Перечень сокращений и условные обозначения:

- ППУ – пенополиуретан
- ПЭ – полиэфир
- ПВХ – поливинилхлорид.

7.2 Материалы, контактирующие с организмом человека

1. Трикотажная смесовая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный молочным красителем марки Berqua White 10G-Q C.I. Pigment White 3, производства «Bersa Tekstil ve Kimya San.Ltd.Şti.» (ТУРЦИЯ) следующего состава: 80% хлопок+20% полиэстер - Подушка Classic (XXL, XL, plus), Classic Aloe Vera (XL, L), Premium 1, Termogel (XL plus, L).
2. Трикотажная смесовая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный синим красителем марки Remazol Blue SAM производства DYSTAR INDIA LTD (Индия) следующего состава: 80% хлопок+20% полиэстер –Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit, Под ноги.
3. Трикотажная смесовая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный серым красителем марки Remazol Grey SAM производства DYSTAR INDIA LTD (Индия) следующего состава: 80% хлопок+20% полиэстер – Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit, Под ноги.
4. Трикотажная смесовая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный лиловым красителем марки Remazol Ultra Red SAM производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) следующего состава: 80% хлопок+20% полиэстер – Подушка Lavanda Classic M.
5. Трикотажная смесовая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный ярко-салатовым красителем марки Remazol Green SAM производства DYSTAR INDIA LTD (Индия) следующего состава: 80% хлопок+20% полиэстер – Подушка Comfort.
6. Трикотажная смесовая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный розово-бежевым красителем марки Remazol Gold SAM производства

«DYSTAR INDIA LTD» (Индия) следующего состава: 80% хлопок+20% полиэстер – Подушка BeautyLux.

7. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный молочным красителем марки Berqua White 10G-Q C.I. Pigment White 3, производства Bersa Tekstil ve Kimya San.Ltd.Şti. (ТУРЦИЯ) - Подушка Classic (XXL, XL, plus), Classic Aloe Vera (XL, L), Premium 1, Termogel (XL plus, L).

8. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный красителем марки Berqua White BR-Q C.I. Pigment White 7 (растительный орнамент), производства Bersa Tekstil ve Kimya San.Ltd.Şti. (ТУРЦИЯ) - Подушка Classic (XXL, XL, plus), Classic Aloe Vera (XL, L), Premium 1, Termogel (XL plus, L).

9. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный синим красителем марки Remazol Blue SAM производства DYSTAR INDIA LTD (Индия) следующего состава: 100% полиэстер –Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit, Под ноги.

10. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный серым красителем марки Remazol Grey SAM производства DYSTAR INDIA LTD (Индия) следующего состава: 100% полиэстер - Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit, Под ноги.

11. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный лиловым красителем марки Remazol Ultra Red SAM производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) – Подушка Lavanda Classic M.

12. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный ярко-салатовым красителем марки Remazol Green SAM производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) – Подушка Comfort.

13. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный белым красителем марки Remazol White SAM производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) – Подушка Comfort.

14. Трикотажная полиэстеровая ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный бирюзовым красителем марки Remazol Royal SAM производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) – Подушка Ideal.

15. Полиэстеровая марка Поплекс, производства фирмы «Hebei Oak New Material Co., Ltd.» (Китай), окрашенный бежевым красителем марки марка SW3 (CAN07-115807.002) производства «Guangxi Qise Pearlescent Materials Co., Ltd.» (Китай) - Наволочка из смешанной, ткани (съёмная на молнии), подушка Клиновидная, подушка Клиновидная -

трансформер.

16. Хлопчатобумажная ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный красителем марки Berqua White BR-Q C.I. Pigment White 7 (цветной орнамент), производства «Bersa Tekstil ve Kimya San.Ltd.Şti.» (ТУРЦИЯ) – Наволочка, подушка BabySleep.

17. Хлопчатобумажная ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный красителем марки Remazol Melange Grey SAM (серый меланж), (в технология ткани присутствуют нити 2 цветов серая и белая) производства производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) – Несъемная наволочка Classic Simple M, наперник.

18. Хлопчатобумажная ткань, производства фирмы «Zelal Textil» (Узбекистан), окрашенный бирюзовым красителем марки Remazol Royal SAM, производства производства «DYSTAR INDIA LTD» (Индия) – Несъемная наволочка Termogel (XL plus, L), наперник.

8. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Санитарно-гигиенические показатели используемых материалов соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876), Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797) и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», глава II, раздел 18.

8.2 Подушки характеризуются отсутствием токсичности (водная вытяжка из материалов не должна обладать раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожные покровы, уровень выделения химических веществ из материалов в воздушную среду при насыщенности $0,3 \text{ м}^2/\text{м}^3$ не должна превышать допустимый).

8.3 Материалы изделий не оказывают раздражающего, сенсibiliзирующего, а также недопустимого биологического воздействий.

Материалы подушек, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

8.4 Материалы Подушек устойчивы к дезинфекции и химической чистке в соответствии с ГОСТ 11207-65; чехлы допускают стирку с применением бытовых моющих средств.

8.5 Подушки горючи согласно ГОСТ 12.1.044; наполнитель при контакте с открытым огнем горит коптящим пламенем с образованием расплава и с выделением токсичных веществ.

8.6 При комнатной температуре базовые марки пенополиуретана не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При нарушении норм и правил применения Подушек, установленных в настоящем Руководстве по эксплуатации, предприятие-изготовитель и продавец, независимо от сроков приобретения продукции, не несут какой бы то ни было ответственности за любые последствия, наступившие при применении Подушек, в том числе повлекшие нанесение ущерба здоровью человека.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение Подушек при обнаружении дефектов, механических или иных повреждений!

9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Использование подушек должно осуществляться в соответствии с прилагаемой инструкцией по применению.

9.2 Перед применением необходимо проверить качество упаковки, отсутствие механических и иных повреждений.

9.3 Подушки следует извлечь из упаковки и путем визуального осмотра убедиться в отсутствии дефектов, влияющих на их пригодность к применению.

9.4 Особенности функциональных свойств Подушек:

- изделие не теряет свой объем и форму при длительной эксплуатации;
- применение не ограничено в части возрастного показателя, с условием соблюдения размерного ряда и индивидуальных особенностей покупателя;
- после длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать подушки в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

Для вариантов исполнения «Подушка Termogel XL Plus - 58x38x12/14» и «Подушка Termogel L - 58x38x12/10» в состав входит гелевая вставка (несъёмная).

Подушки Termogel имеют вставку с гелем, который наносится на поверхность наполнителя из пенополиуретана с анатомической формой. Гелевая вставка имеет прямоугольную форму и структурную поверхность - выпуклые ячейки квадратной формы.

Свойства гелевой вставки: подстраивается под форму головы и шеи; не твердеет и не изнашивается, сохраняет механические свойства и упругость; не содержит летучих веществ.

Анатомическая форма и гелевая вставка у подушки способствуют предотвращению сдавливания мягких тканей, что приводит к уменьшению пролежней.

Для вариантов исполнения «Подушка Lavanda Classic M», «Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit» и «Подушка BeautyLux» в состав входит вкладыш для регулировки высоты.

Вкладыш для подушек Подушка Lavanda Classic M и Подушка BeautyLux. В комплекте имеется вкладыш для регулировки высоты подушки, который можно использовать по необходимости (он легко как вставляется, так и вынимается из съёмной наволочки).

Изготовлен вкладыш из пенополиуретан высокой плотности. Благодаря ему можно отрегулировать наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии.

Вкладыш для подушки Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit. Подушка применяется, чтобы вырез был со стороны копчика. Благодаря своей наклонной форме, подушка-квадрат помогает подавать таз вперед, формируя при этом физиологически правильное положение.

Подушка состоит из двух слоев, верхний - из пенополиуретана с "эффектом памяти", которая способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

При желании вкладыш легко можно вынуть из наволочки и оставить только часть с наклонной формой.

- применение подушки BabySleep рассчитаны на возраст от 1 месяцев до 1,5 лет.

- применение подушки Classic XS рассчитаны на возраст от 1,5 до 3 лет.

9.5 Функциональное назначение и принцип действия для следующих вариантов исполнения Подушек:

- Подушка Classic Aloe Vera имеет анатомическую форму - подшейные валики разной высоты. Данная форма подушки способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- Подушка **Termogel** имеет анатомическую форму - подшейные валики разной высоты. На поверхность наполнителя из пенополиуретана нанесена гелевая вставка. Гелевая вставка имеет прямоугольную форму и структурную поверхность - выпуклые ячейки квадратной формы. Свойства гелевой вставки: подстраивается под форму головы и шеи; не твердеет и не изнашивается, сохраняет механические свойства и упругость; не содержит летучих веществ.

Анатомическая форма и гелевая вставка у подушки способствуют предотвращению сдавливания мягких тканей, что приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- Подушка **Classic Simple M** имеет анатомическую форму - подшейные валики разной высоты. Подушка не имеет эффекта обратного давления. Данная форма подушки способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- Подушка **Lavanda Classic M** имеет специальную анатомическую форму - подшейные валики разной высоты. В комплекте вкладыш для регулировки высоты, благодаря которому можно отрегулировать физиологически наиболее правильное положение тела человека во время сна и отдыха. Форма подшейного валика идеально соответствует анатомии позвоночника и способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- Подушка **Comfort** имеет классическую форму, которая подходит для большинства взрослых. Благодаря наполнителю изделия (вязкоэластичному пенополиуретану), подушка не имеет эффекта обратного давления, способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- **Подушка Ideal** имеет специальную выемку, которая позволяет максимально удобно спать в абсолютно любом положении. Центральная П-образная выемка соответствует анатомии позвоночника и способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- **Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit** имеет наклонную форму. Подушка применяется, чтобы вырез был со стороны копчика. Благодаря своей наклонной форме, подушка-квадрат помогает подавать таз вперед, формируя при этом физиологически правильное положение. Подушка состоит из двух слоев, верхний - из пенополиуретана с "эффектом памяти", которая способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- **Подушка под ноги** имеет волнообразную форму, анатомически соответствует форме ног человека. Угол наклона подушки создает физиологически правильное положение. Основа из пенополиуретана, который длительное время сохраняет свою форму. Есть вкладыш для регулировки высоты, наполнитель вкладыша – пенополиуретан. Подушка способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- **Подушка BeautyLux** имеет центральную П-образную выемку, которая соответствует анатомии позвоночника, а также специальные выемки-углубления для длительного сна на боку. Данная подушка способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее

правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- **Подушка Клиновидная** имеет специальную клиновидную форму для регулировки высоты спального места. Тело человека во время сна и отдыха принимает равномерно приподнятое положение.

Подушка Клиновидная изготовлена из пенополиуретана. Плотность наполнителя обеспечивает поддержку верхней части тела и головы человека в физиологически наиболее правильном положении. Данная подушка способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

- **Подушка Клиновидная-трансформер** имеет специальную клиновидную форму, благодаря которой можно отрегулировать высоту спального места.

Тело человека во время сна и отдыха принимает равномерно приподнятое положение. Подушка Клиновидная-трансформер изготовлена из пенополиуретана двух видов (марок): плотный - для оптимальной поддержки тела и более мягкий с "эффектом памяти" - для предотвращения сдавливания мягких тканей.

Плотность наполнителей обеспечивает поддержку верхней части тела и головы человека в физиологически наиболее правильном положении. Данная подушка способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Функциональное назначение: применение подушки обеспечивает физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии и предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.



В целях предотвращения устойчивой деформации желательно использовать Подушки на ровной поверхности!

9.6 Методика применения подушек Lavanda Classic M, BeautyLux, Квадрат с уклоном OrtoSit

9.6.1 Подушка Lavanda Classic M

Подушка Lavanda Classic M в комплекте имеет вкладыш для регулировки высоты подушки, который изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, высота составляет 2 см. Данную модель возможно использовать с вкладышем для регулировки высоты и без него.

Высота валиков подушки без использования вкладыша составляет 9 и 11 см. Высоту валиков у подушки можно увеличить за счет использования вкладыша. В таком случае высота увеличится на 2 см с каждой стороны и составит 11 и 13 см. В базовой комплектации подушки вкладыш уже вставлен в съемную наволочку (цвет лиловый) на молнии снизу.

Для того чтобы вытащить вкладыш необходимо:

1. Перевернуть подушку нижней стороной вверх, где находится молния съемной наволочки.
2. Расстегнуть молнию съемной наволочки.
3. Вытащить вкладыш.
4. Застегнуть съемную наволочку (цвет лиловый).
5. Подушка готова к использованию. Высота валиков составляет 9 и 11 см.

Если необходимо вернуть вкладыш обратно и увеличить высоту подушки, то последовательность действий такая:

1. Перевернуть подушки нижней стороной вверх, где находится молния съемной наволочки.
2. Расстегнуть молнию съемной наволочки.
3. Вставить вкладыш так, чтобы он прилегал к нижней части наполнителя, обшитого в несъемную наволочку (цвет серый меланж).
4. Застегнуть съемную наволочку (цвет лиловый).
5. Подушка готова к использованию. Высота валиков составляет 11 и 13 см.

Таким образом, благодаря наличию или отсутствию в подушке вкладыша, можно отрегулировать наиболее комфортное и правильное положение позвоночника во время сна и отдыха, тем самым улучшить микроциркуляцию крови в шейно-воротниковой зоне.

Верно, подобранная высота подушек предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

9.6.2 Подушка BeautyLux

Подушка BeautyLux в комплекте имеет вкладыш для регулировки высоты подушки, который изготовлен из пенополиуретана высокой плотности, высота составляет 2 см.

Данную модель возможно использовать с вкладышем для регулировки высоты и без него.

Высота валиков подушки без использования вкладыша составляет 10 и 8,5 см.

Высоту валиков у подушки можно увеличить за счет использования вкладыша. В таком случае высота увеличится на 2 см с каждой стороны и составит 12 и 10,5 см. В базовой комплектации подушки вкладыш уже вставлен в съемную наволочку (цвет розово-бежевый) размера 2, на молнии снизу.

Для того чтобы вытащить вкладыш необходимо:

1. Перевернуть подушку нижней стороной вверх, где находится молния съемной наволочки (цвет розово-бежевый).
2. Расстегнуть молнию съемной наволочки.
3. Вытащить вкладыш.
4. Снять съемную наволочку размера 2 (больше) и заменить ее на съемную наволочку размера 1 (меньше).
5. Застегнуть съемную наволочку.
6. Подушка готова к использованию. Высота валиков составляет 10 и 8,5 см.

Если необходимо вернуть вкладыш обратно и увеличить высоту подушки, то последовательность действий такая:

1. Перевернуть подушки нижней стороной вверх, где находится молния съемной наволочки.
2. Расстегнуть молнию съемной наволочки.
3. Снять съемную наволочку размера 1 (меньше) и заменить ее на съемную наволочку размера 2 (больше).
4. Вставить вкладыш так, чтобы он прилегал к нижней части наполнителя, обшитого в несъемную наволочку (цвет серый меланж).
5. Застегнуть съёмную наволочку (цвет розово-бежевый).
6. Подушка готова к использованию. Высота валиков составляет 12 и 10,5 см.

Таким образом, благодаря наличию или отсутствию в подушке вкладыша, можно отрегулировать наиболее правильное положение, которое способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Верно, подобранная высота подушек предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

9.6.3 Подушка Квадрат с уклоном OrtoSit имеет наклонную форму. Подушка применяется, чтобы вырез был со стороны копчика. Благодаря своей наклонной форме, подушка-квадрат помогает подавать таз вперед, формируя при этом физиологически

правильное положение.

Подушка состоит из двух слоев, верхний - из пенополиуретана с "эффектом памяти", которая способствует предотвращению сдавливания мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Высота сторон подушки без использования вкладыша составляет 5 и 1 см. Высоту у подушки можно увеличить за счет использования вкладыша. В таком случае высота увеличится на 2 см и составит 7 и 3 см. В базовой комплектации подушки вкладыш уже вставлен в съемную наволочку (цвет синий/серый), на молнии снизу.

Для того чтобы вытащить вкладыш и тем самым снизить угол наклона подушки, необходимо:

1. Повернуть к себе подушку той стороной, которая имеет больший угол наклона, там находится молния съемной наволочки.
2. Расстегнуть молнию съемной наволочки.
3. Вытащить вкладыш.
4. Застегнуть съемную наволочку.
5. Подушка готова к использованию. Высота сторон составляет 5 и 1 см.

Если необходимо вернуть вкладыш обратно и увеличить высоту подушки, то последовательность действий такая:

1. Повернуть к себе подушку той стороной, которая имеет больший угол наклона, там находится молния съемной наволочки.
2. Расстегнуть молнию съемной наволочки.
3. Вытащить подушку из наволочки.
4. Приложить вкладыш так, чтобы он плотно прилегал к верхней части наполнителя.
5. Вставить эти две части в съемную наволочку.
6. Застегнуть съемную наволочку (цвет синий/серый).
7. Подушка готова к использованию. Высота валиков составляет 7 и 3 см.

9.7 Не допускается воздействие на поверхность Подушек острыми и твердыми предметами (резание, царапание и др.), или агрессивными жидкостями (кислотами, щелочами, растворителями и т. п.).

10. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию и стирку подушки и его

комплектующих согласно данному разделу.

10.1. Уход, дезинфекция и стирка

1) Снять наволочку с подушки (при наличии).

2) Удалить крупные частицы загрязнения.

3) Дезинфекция

Внешние поверхности подушек протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-74 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644- 96 или иные средства согласно МУ 287-113-98.

4) Стирка

Наволочки можно подвергать машинной стирке при максимальной температуре 30 °С (обычный режим). Режимы полоскания и отжима должны быть обычные. Изменение линейных размеров после стирки должно быть не более 5 %.

⚠ Наволочки рекомендуется перед стиркой вывернуть наизнанку.

⚠ Внимание! Изделия запрещено отбеливать!

⚠ Внимание! Изделие запрещено гладить!

⚠ Внимание! Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Сушку наволочки осуществлять барабанным методом, при температуре не более 80 °С

В случае нарушения целостности наволочки: разрывов, проколов, порезов изделие необходимо утилизировать согласно Разделу 12.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Подушки, упакованные в транспортную тару, транспортируют всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

11.2 Условия транспортирования подушек должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 100%).

11.3 Условия хранения подушек в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при

температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98%).

12. УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Утилизация подушек должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21.

12.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 подушки относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

12.3 Перед утилизацией подушки должны быть подвергнуты санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

12.4 Подушки подлежат утилизации в случае;

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

12.5 Допускается утилизацию осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие Подушек требованиям ТУ 32.50.22–001–12135107–2018 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации Подушек – 24 месяца со дня продажи.

Все дефекты изделий, обнаруженные в течение гарантийного срока, влекущие нарушение их характеристик при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

13.3 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений Подушек при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями, не оговоренными в настоящем Руководстве.

13.4 Качество применяемых в Подушках материалов подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами или декларациями соответствия, паспортами).

13.5 Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Претензии в адрес изготовителя представляют в случае невозможности ремонта подушки на ремонтном предприятии, обслуживающем изделие.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и индивидуальный штрих код изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому он получен;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей т.д.

По всем вопросам, касающимся использования подушек, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «ОРТОМЕД»

Юридический адрес: 347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 37-26, офис 1.

Телефон: +7 (800) 301-25-13, E-mail: ortomed1@mail.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено 43 листов.
печатью (сорок три)

Генеральный Директор

Скориненко Д.А.
Д.А. Скориненко



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОРТОМЕД»



**Подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из
формованного пенополиуретана медицинские по
ТУ 32.50.22-001-12135107-2018
(вариант исполнения Premium 1)**

ПАСПОРТ

939800.001.12135107 ПС-02

Ростовская область,
г. Таганрог,
2022 г.

Общие указания

1. Перед использованием Подушек «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана медицинских по ТУ 32.50.22-001-12135107-2018 (далее по тексту – Подушки) необходимо:

- проверить их соответствие маркировочным данным;
- внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации;
- изучить надлежащую информацию по эффективному и безопасному использованию.

2. *За ситуации, сложившиеся при неправильном использовании Подушек, производитель ответственности не несёт!*

3. В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

4. После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).

5. Паспорт выполнен в соответствии с ГОСТ 2.6102006.

Внимание! Просим обратить внимание на то, что правильное и своевременное заполнение настоящего Паспорта поможет избежать непредвиденных расходов из-за несоблюдения правил применения Подушек.

6. *Для возможности ведения форм и таблиц Паспорта допускается изымать страницу и размножать её в необходимом количестве.*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения.....	4
2. Основные технические данные.....	5
3. Комплектность.....	8
4. Уход за изделием	8
5. Утилизация	9
6. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя.....	10
7. Транспортирование и хранение.....	10
8. Сведения о рекламации	11
9. Свидетельство о приемке.....	12
10. Свидетельство об упаковывании.....	13
Форма гарантийного талона.....	14

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана медицинские по ТУ 32.50.22-001-12135107-2018 (вариант исполнения Premium 1)

Обозначение изделия:
(в соответствии с размером, цветом)

Дата изготовления:
(число, месяц, год)

Наименование изготовителя: ООО «ОРТОМЕД»

Адрес: 347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Котлостроительная 37-26, офис 1
тел.: +7 (800) 301-25-13, **факс:**
эл. почта: ortomed1@mail.ru

Подушки изготовлены в соответствии с

ТУ 32.50.22-001-12135107-2018 изм. №1, ГОСТ Р 15.013-2016, ГОСТ Р 57769-2021, ГОСТ Р 50444-2020 и «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 г. № 299 (глава II, раздел 18).

Сертификат (декларация) соответствия №, срок действия
с..... по..... выдан органом.....
.....
.....

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Назначение – подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана (ППУ) медицинские (далее – подушки, изделие), используемые в качестве ортопедических средств, обеспечивающих физиологически наиболее правильное положение тела человека длительное время находящегося в неподвижном состоянии. Применение подушек предотвращает сдавливание мягких тканей, приводит к уменьшению пролежней.

Подушки предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях в домашних условиях.

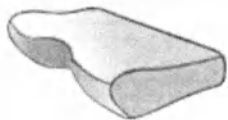
Внимание! Любое другое использование считается использованием изделий не по назначению!

2.2 Подушки в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования относятся к классу Г по ГОСТ Р 50444-2020.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия - 1 по ГОСТ 31508-2012 и Приказу МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г. (с изменениями от 25.09.2014 г.), вид – неинвазивное, длительного применения.

2.3 Форма, габаритные размеры и масса представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование (модель)	Общий вид	Размеры, см	Масса, (с несъемной наволочки) г
Подушки			
Premium 1		54x34x9/12	1500

Допускаемые отклонения по габаритным размерам подушки: $\pm 2,0$ см.

Допускаемое отклонение по массе: ± 5 %.

Наименование (модель)	Общий вид	Размеры, не более см	Масса, не более г
Наволочки			
Premium 1	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	55x35	30
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани\ из трикотажной полиэстеровой ткани	55x35	40

Основа (наполнитель) подушек должна изготавливаться из вязкоэластичного

пенополиуретана методом теплого формования при реакции двух компонентов:

А - смесь простых полиэфиров, воды, пеностабилизаторов, катализаторов;

Б - дифенилметандиизоцианат

Несъемная наволочка для подушки исполнения Premium 1 изготовлена из хлопчатобумажной ткани.

К подушке исполнения Premium 1 прилагается съемная наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани.

Подушка не должна изменять свой объем и форму при длительной эксплуатации более чем на 10%. Время восстановления первоначального объема должно быть не более 60 с.

Время сохранения остаточной деформации подушки должен быть от 2 до 6 с.

Цветовые исполнения наволочек изделия должны быть:

Premium 1- несъемная наволочка серый меланж; съемная наволочка – молочный.

Застёжки - «молния» наволочек (если предусмотрены) должны обеспечивать прочное и плотное соединение.

Усилие размыкания застёжки-«молнии» должно быть в пределах 20-40 Н.

Технический проем на несъемной наволочке должен быть зашит швом «на лицо», ширина шва от 0,4 до 0,6 мм.

Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества; допустимое отклонение строчек от края должно быть не более 2 мм.

Виды и параметры стежков, строчек и швов, применяемых при пошиве, а также их внешний вид должны соответствовать требованиям ГОСТ 12807.

Количество стежков на 5 см машинной строчки должно быть при пошиве не менее 12, при выстегивании изделий (8 ± 1).

Нагрузка разрывная для швов изделий по длине 100 мм должна быть не менее 100 Н.

Строчка на подушках должна быть без искривлений, влияющих на внешний вид и прочность изделий, нить строчки хорошо натянута.

Нитки для страчивания и настрачивания должны быть в цвет или контрастные (в соответствии с моделью).

Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

Подушки должны быть без складок и сборок. Глубина складок должна быть не более 5 мм.

Части несъемных наволочек (наперников) подушек должны быть соединены сточным швом шириной 15 ± 2 мм.

На поверхностях несъемных наволочек не допускаются инородные включения, надрывы, порезы, вздутия, дыры, проколы, прорубание машинной иглой, обрывы нитей в отделочных строчках и другие пороки.

Наполнитель подушек должен быть равномерно распределен.

Гигроскопичность на поверхности подушек должна быть не менее 6 %.

Воздухопроницаемость на поверхности подушек должна быть не менее $100 \text{ дм}^3/\text{м}^2 \text{ с}$.

Пористость подушек должна быть не более 45%.

Физико-механические свойства материала подушек приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование показателей	Норма для эластичного ППУ и вязко-эластичного ППУ
Разрушающее напряжение при растяжении, КПа	Не менее 70
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 100
Относительная остаточная деформация через 72 ч при температуре 20°C и 50%-ном сжатии, %	Не более 5
Кажущаяся плотность, кг/м ³	12-60
Напряжение сжатия при 40%-ной деформации; КПа	2...4

Средний срок службы подушек должен быть не менее 5 лет.

Для изготовления основных элементов подушек и наволочек должно использоваться сырье и материалы согласно таблице 2.3.

Таблица 2.3

Подушка Premium 1	Наполнитель – вязкоэластичный пенополиуретан	А ВЭЛ 1004 НК Polyol, А ВЭЛ 1006 НК Polyol	Смесь полиэфирполиолов ("А" + "С") Полиэтиленоксид 1,1,1,2-Тетрафторэтан	Нет контакта с организмом человека
	Несъемная наволочка хлопчатобумажная ткань	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)	Хлопок 100%	Нет контакта с организмом человека
	Наволочка (съемная) из трикотажной смесовой	ООО «Zelal Textil» (Узбекистан)	Хлопок 80%, ПЭ 20% / полиэстер 100%	Продолжительный контакт с неповрежденной

	ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	--		кожей
--	--	----	--	-------

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки подушек:

Подушка «ORTOCORRECT» Premium 1 в составе:

	Подушка Premium 1	ФМТК.942519.-02	1 шт.
	Наволочка из хлопчатобумажной ткани	ФМТК.942519.-02НХ	1* шт.
	Наволочка из трикотажной смесовой ткани/трикотажной полиэстеровой ткани	ФМТК.942519.-02НС	1* шт.
	Индивидуальная упаковка	ФМТК.942519.-02ИУ	1 шт.
	Ярлык на подушку ²	ФМТК.942519.-02Я	1 шт.
	Этикетка на упаковку ³	ФМТК.942519ЭТ	1 шт.
	Руководство по эксплуатации	939800.001.12135107 РЭ	1 шт.
	Паспорт	939800.001.12135107ПС	1 шт.

Примечания:

¹ Исполнение подушки определяется при заказе по согласованию с заказчиком.

² Ярлык пришивается на подушку.

³ Этикетка наклеивается на индивидуальную упаковку.

* Данная принадлежность может поставляться по согласованию с заказчиком.

4. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию и стирку подушки и его комплектующих согласно данному разделу.

4.1. Уход, дезинфекция и стирка

- 1) Снять наволочку с подушки (при наличии).
- 2) Удалить крупные частицы загрязнения.
- 3) Дезинфекция

Внешние поверхности подушек и наволочек протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-74 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644- 96 или иные средства согласно МУ 287-113-98.

4) Стирка

Наволочки можно подвергать машинной стирке при максимальной температуре 30 °С (обычный режим). Режимы полоскания и отжима должны быть обычные. Изменение линейных размеров после стирки должно быть не более 5 %.

Режимы полоскания и отжима должны быть обычные. Изменение линейных размеров после стирки должно быть не более 5 %.

Устойчивость окраски материалов верха и подкладки изделий должна быть не менее 3 баллов.

⚠ Наволочки рекомендуется перед стиркой вывернуть наизнанку.

⚠ Внимание! Изделия запрещено отбеливать!

⚠ Внимание! Изделие запрещено гладить!

⚠ Внимание! Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Сушку осуществлять барабанным методом, при температуре не более 80 °С.

В случае нарушения целостности подушки и наволочки: разрывов, проколов, порезов изделие необходимо утилизировать согласно Разделу 5.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Утилизация подушек должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21.

5.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 подушки относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

5.3 Перед утилизацией подушки должны быть подвергнуты санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

5.4 Подушки подлежат утилизации в случае;

- окончания срока эксплуатации;

- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью

медработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

5.5 Допускается утилизацию осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие Подушек установленным требованиям при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и использования.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации Подушки – 24 месяца со дня продажи.

6.3 В период гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет бесплатную замену Подушек в случае обнаружения дефектов.

6.4 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:

- механических повреждений Подушек при перевозке и хранении;
- ненадлежащего их использования;
- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями, не оговоренными в руководстве по эксплуатации и в настоящем паспорте.

6.5. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Подушки, упакованные в транспортную тару, транспортируют всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

7.2 Условия транспортирования подушек должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

7.3 Условия хранения подушек в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и относительной влажности до 98%).

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Регистрируются все предъявленные рекламации и их краткое содержание.

8.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

8.3 В случае вскрытия дефектов Подушек в период гарантийного срока следует составить технически обоснованные сведения о рекламации по форме таблицы 8.1.

Таблица 8.1

Номер рекламаций	Дата	Содержание рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

Примечание - Первые четыре графы заполняет эксплуатирующая организация при обнаружении неисправностей в период гарантийного срока, а последующие графы - завод-изготовитель.

Сведения следует направить предприятию-изготовителю (поставщику) по указанному адресу.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

*Подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана
медицинские*

(наименование изделия)

.....

.....

(обозначение изделия)

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации и признаны годными для применения.

Зам. генерального директора

(ответственный за выпуск продукции)

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

год, месяц, число

**Ответственный за технический
контроль продукции (ОТК)**

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

год, месяц, число

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

*Подушки «ORTOCORRECT» с наполнителем из формованного пенополиуретана
медицинские*

.....

(наименование, обозначение изделия)

упакованы в соответствии с ГОСТ 10581-91 и Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №769).

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Подушка ортопедическая,

исполнение подушки _____ индивидуальный штрих код _____

Приобретена _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец

(подпись, печать)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено 14 листов.
печатью (летографуать)

Генеральный Директор

Жорженко Д.

Ростов

