

«APPROVED»

CEO of GN Hearing A/S
(position)

Axel Marcus Peter Karlstrømer
(name)




Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
CVR: 55082715
(Stamp)

«__» 2024-09-23

CFO of GN Hearing A/S
(position)

Søren Jelert

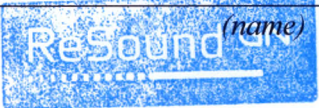

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
CVR: 55082715
(Stamp)

«__» 2024-09-23

USER MANUAL
TO THE MEDICAL DEVICE

«Receiver-In-The-Ear hearing aid ReSound OMNIA» with accessories

Version: 02
Year: 2024

GN ReSound A/S | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup | Denmark | +45 45 75 11 11
Co. Reg. no. 55082715 | info@gnresound.com | www.resound.com



I, the undersigned, **N. E. Christensen**, notary public of Copenhagen, Denmark, hereby certify that

Mr. Axel Marcus Peter Karlströmer
and
Mr. Søren Jelert

who proved their identities to me by presentation of their passports, have signed this document. This certification is provided on the basis of specimen signatures filed with the notarial office.

I furthermore certify that pursuant to the records of the Danish Business Authority, from September 24, 2024, Mr. Axel Marcus Peter Karlströmer and Mr. Søren Jelert are authorised signatories of these two public limited companies, respectively,

GN Hearing A/S
and
ReSound GN A/S

when acting together.

There were no conspicuous amendments or additions in the document other than those signed (initialled) by me.

In witness whereof I have hereunto set my hand and notarial seal.

The City Court of Copenhagen, Notarial Acts Division, September 25, 2024

N. E. Christensen
N. E. Christensen
Notary Public of Copenhagen, Denmark



Информация о слуховом аппарате

Левый слуховой аппарат		Правый слуховой аппарат	
Серийный номер		Серийный номер	
Номер модели		Номер модели	
Тип элемента питания	☐ Воздушно-цинковая312 ☐ Воздушно-цинковая13		
Режим работы	Продолжительный		
Вид контакта с организмом человека	- кратковременный контакт (менее 24 ч) с неповрежденной кожей не стерильный.		
Класс защиты от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды	IP 68.		
В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1 тип рабочей части – В.			
СА не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения. В СА не применяются лекарственные средства, биологические материалы и наноматериалы. СА предназначен для индивидуального применения и является неинвазивным изделием.			
Аппарат НЕ предназначен для использования в среде с повышенным содержанием кислорода, или в комбинации кислорода с воспламеняющимися анестетиками и другими огнеопасными веществами!			

Тип ушного вкладыша	Закрытый вкладыш ☐ Маленький ☐ Средний ☐ Большой	Открытый вкладыш ☐ Маленький ☐ Средний ☐ Большой	Мощный вкладыш ☐ Маленький ☐ Средний ☐ Большой	☐ Вкладыш-тюльпан	☐ Ушной вкладыш RIE
---------------------	--	--	--	--	--

Программа	Звуковой сигнал	Описание
1	Один звуковой сигнал	
2	Два звуковых сигнала	
3	Три звуковых сигнала	
4	Четыре звуковых сигнала	

Введение

Мы благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на слуховых аппаратах ReSound. Мы рекомендуем использовать слуховые аппараты каждый день.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно прочитайте это руководство, ПРЕЖДЕ ЧЕМ начать использовать ваши слуховые аппараты.

Этот документ действителен для следующих слуховых аппаратов:

Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU961-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU961-DRW (цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;
 2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit -1 шт. (при необходимости);
 3. Элемент питания тип 312 – 6 шт. (при необходимости);
 4. Цветной маркер красный – 1 шт;
 5. Цветной маркер синий – 1 шт;
 6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP – 1 шт; (при необходимости);
 10. Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 11. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 12. Вкладыш SF3 тюльпан - 10 шт./уп. (при необходимости);
 13. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 14. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 15. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 16. Футляр пластиковый – 1 шт.;
 17. Набор для очистки: салфетка, щетка- 1 шт.
 18. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.
- Принадлежности:
1. Фильтр серный -8 шт./уп.;
 2. Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

II. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU962-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU962-DRW (цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;
2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit -1 шт. (при необходимости);
3. Элемент питания тип 13 – 6 шт. (при необходимости)
4. Цветной маркер красный – 1 шт;
5. Цветной маркер синий – 1 шт;
6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт; (при необходимости);
7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт; (при необходимости);
8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт; (при необходимости);

9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP– 1 шт; (при необходимости);
- 10.Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт; (при необходимости);
- 11.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт; (при необходимости);
- 12.Вкладыш SF3 зольпан - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 13.Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 14.Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 15.Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 16.Футляр пластиковый – 1шт.;
- 17.Набор для очистки: салфетка, щетка – 1 шт.
- 18.Руководство по эксплуатации на медицинское изделие Аппарат слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;

Принадлежности:

- 1.Фильтр серный -8 шт./уп.;
- 2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

III. Аппарат слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU761-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU761-DRW(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;
2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit -1 шт. (при необходимости);
3. Элемент питания тип 312 – 6 шт. (при необходимости)
4. Цветной маркер красный – 1шт;
5. Цветной маркер синий – 1 шт;
6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1шт. (при необходимости);
7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1шт. (при необходимости);
8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1шт. (при необходимости);
9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP – 1шт. (при необходимости);
- 10.Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1шт. (при необходимости);
- 11.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1шт. (при необходимости);
- 12.Вкладыш SF3 зольпан - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 13.Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 14.Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 15.Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
- 16.Футляр пластиковый– 1шт.;
- 17.Набор для очистки: салфетка, щетка – 1 шт.
- 18.Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;

Принадлежности:

- 1.Фильтр серный -8 шт./уп.;
- 2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

IV. Аппарат слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU762-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU762-DRW(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;

2. Программного обеспечения ReSound Smart Fit-1 шт. (при необходимости);
 3. Элемент питания тип 13 – 6 шт. (при необходимости)
 4. Цветной маркер красный – 1 шт.;
 5. Цветной маркер синий – 1 шт.;
 6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1шт. (при необходимости);
 7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4- 1шт. (при необходимости);
 8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 -1шт. (при необходимости);
 9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP -1шт. (при необходимости);
 - 10.Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 -1шт. (при необходимости);
 - 11.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 -1шт. (при необходимости);
 - 2.Вкладыш SF3 тюльпан, 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 13.Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 14.Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 15.Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 16.Футляр пластиковый –1 шт.;
 - 17.Набор для очистки: салфетка, щетка – 1 шт.
 - 18.Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.
- Принадлежности:
- 1.Фильтр серный -8 шт./уп.;
 - 2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

V. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU561-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU561-DRW(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искриющийся серебряный) – 1 шт.;
 2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit – 1 шт. (при необходимости);
 3. Элемент питания тип 312 – 6 шт. (при необходимости)
 4. Цветной маркер красный – 1 шт.;
 5. Цветной маркер синий – 1 шт.;
 6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4- 1 шт. (при необходимости);
 8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP - 1 шт. (при необходимости);
 - 10.Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 - 11.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
 - 12.Вкладыш SF3 тюльпан, 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 13.Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 14.Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 15.Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 - 16.Футляр пластиковый – 1 шт.;
 - 17.Набор для очистки: салфетка, щетка – 1 шт.;
 - 18.Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;
- Принадлежности:
- 1.Фильтр серный -8 шт./уп.;
 - 2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

VI. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU562-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU562-DRW(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;
 2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit – 1 шт. (при необходимости);
 3. Элемент питания тип 13- 6 шт. (при необходимости)
 4. Цветной маркер красный – 1 шт.;
 5. Цветной маркер синий – 1 шт.;
 6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт.(при необходимости);
 9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP - 1 шт.(при необходимости);
 10. Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 11. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
 12. Вкладыш SF3 тюльпан - 10 шт./уп. (при необходимости);
 13. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 14. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 15. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
 16. Футляр пластиковый – 1 шт.;
 17. Набор для очистки: салфетка, щетка – 1 шт.;
 18. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;
- Принадлежности:**
1. Фильтр серный -8 шт./уп.;
 2. Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

VII. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU461-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU461-DRW(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) - 1 шт.;
2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit – 1 шт. (при необходимости);
3. Элемент питания тип 312 – 6 шт. (при необходимости)
4. Цветной маркер красный – 1 шт.;
5. Цветной маркер синий – 1 шт.;
6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP- 1 шт. (при необходимости);
10. Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
11. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
12. Вкладыш SF3 тюльпан, 10 шт./уп. (при необходимости);
13. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

14. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
15. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
16. Футляр пластиковый - 1 шт.;
17. Набор для очистки: салфетка, щетка - 1 шт.
18. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями - 1 шт.

Принадлежности:

- 1.Фильтр серный -8 шт./уп.;
- 2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп.

VIII. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU462-DRW, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU462-DRW(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) - 1шт.;
2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit - 1шт. (при необходимости);
3. Элемент питания тип 13 - 6 шт. (при необходимости)
4. Цветной маркер красный - 1 шт.;
5. Цветной маркер синий - 1 шт.;
6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
8. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
9. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP - 1 шт. (при необходимости);
10. Звуковод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
11. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
12. Вкладыш SF3 тюльпан- 10 шт./уп. (при необходимости);
13. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
14. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
15. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
16. Футляр пластиковый - 1 шт.;
17. Набор для очистки: салфетка, щетка - 1 шт.;
18. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями - 1 шт.;

Принадлежности:

- 1.Фильтр серный -8 шт./уп.;
- 2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE -8 шт./уп

Назначение

Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями, далее по тексту – слуховой аппарат, аппараты или СА предназначен для компенсации потерь слуха путем усиления и передачи звука в ухо.

Условия применения

- Слуховой аппарат предназначен для использования взрослыми и детьми в возрасте 12 лет и старше.
- Слуховой аппарат предназначен для использования непрофессионалами.

Слуховой аппарат должен быть запрограммирован квалифицированным специалистом-сурдологом.

- Конечный пользователь не должен собирать или устанавливать какие-либо компоненты.
- Слуховой аппарат может использоваться в домашних условиях.

Показания к применению

Нейросенсорная, кондуктивная или смешанная потеря слуха.

Противопоказания

Специалист-сурдолог должен рекомендовать будущему пользователю в кратчайшие сроки проконсультироваться с сертифицированным врачом (желательно специалистом по нарушениям слуха) до настройки слуховых аппаратов, если в результате опроса, фактических наблюдений или получения любой другой информации он установит наличие у будущего пользователя любое из нижеперечисленных состояний:

- видимая врожденная или возникшая в результате травмы деформация уха;
- наличие в анамнезе данных об обильных выделениях из уха в течение предшествующих 90 дней;
- наличие в анамнезе данных о внезапной или стремительной прогрессирующей потере слуха в течение предшествующих 90 дней;
- острые или хронические приступы головокружения;
- внезапная или недавняя односторонняя потеря слуха в течение предшествующих 90 дней;
- костно-воздушный разрыв равен или превышает 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц;
- видимые признаки значительного скопления ушной серы или наличия инородного тела в ушном канале;
- боль или дискомфорт в ухе.

Возможные осложнения и эффекты:

Побочные эффекты от ношения слухового аппарата могут быть следующими:

- Головокружение;
- Тиннитус;
- Субъективно воспринимаемое ухудшение слуха;
- Тошнота;
- Покраснение и раздражение кожи;
- Скопление ушной серы

Предупреждающие знаки:

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на ситуацию, которая может привести к серьезным травмам.
-  **ВНИМАНИЕ:** Указывает на ситуацию, которая может привести к травмам легкой и средней степени тяжести.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендации и советы по оптимизации использования вашего слухового аппарата.


Описание символов, которые используются при маркировке:

Символ	Расшифровка
	Указывает на производителя медицинского устройства, как определено в Директиве ЕС 93/42 / ЕЕС.
	Дата изготовления.
	Номер по каталогу.
	Серийный номер.
	Устройство совместимо с iPhone, iPad, iPod.
	Устройство совместимо с ОС Android.
	Обратитесь к Руководству пользователя
IP	Класс защиты от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды
CARR1	Обозначение типа СА
	После использования необходимо сдать в специализированный пункт утилизации
	Соответствие основным требованиям директив ЕС
	Сертификация ACMA (Австралии).
	Сертификация TELEC (Япония)
	Сертификация MCMC (Малайзия)
	Сертификация в США

	Сертификация в Корее
	Уникальный идентификационный номер устройства (UDI). Он позволяет однозначно идентифицировать конкретное медицинское изделие на рынке ЕС.
	Знак указывает на то, что продукт является медицинским изделием, и помогает идентифицировать его как таковое на рынке ЕС.
(01)05708296250172	Знак GTIN – международный код маркировки и учёта логистических единиц;
	Код партии.
	Произведено в Китае.
	Беречь от солнечных лучей.
	Изделие является рабочей частью типа В.
	Знак «вверх»
	«Хрупкое Осторожно»
	Знак Bluetooth
	Устройство использует радиочастотную электромагнитную энергию
	«Беречь от влаги»


Ознакомление со слуховым аппаратом

Слуховые аппараты с элементом питания 312

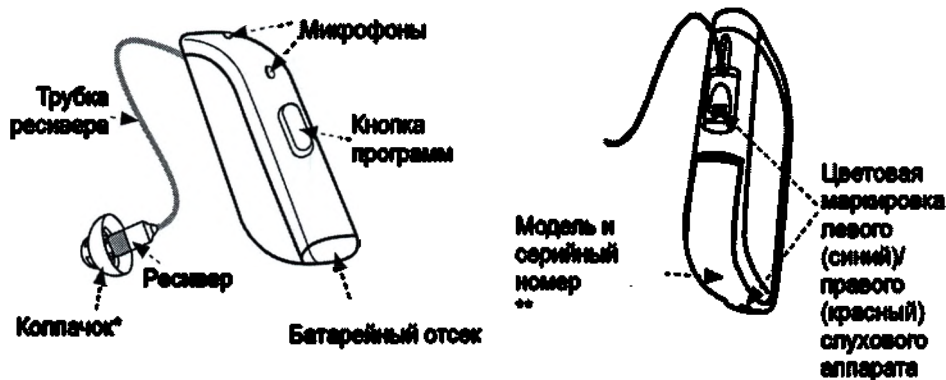



*На иллюстрации изображен открытый вкладыш. Используемый вами вкладыш может выглядеть иначе. **Внутри батарейного отсека.

Слуховые аппараты с элементом питания 13

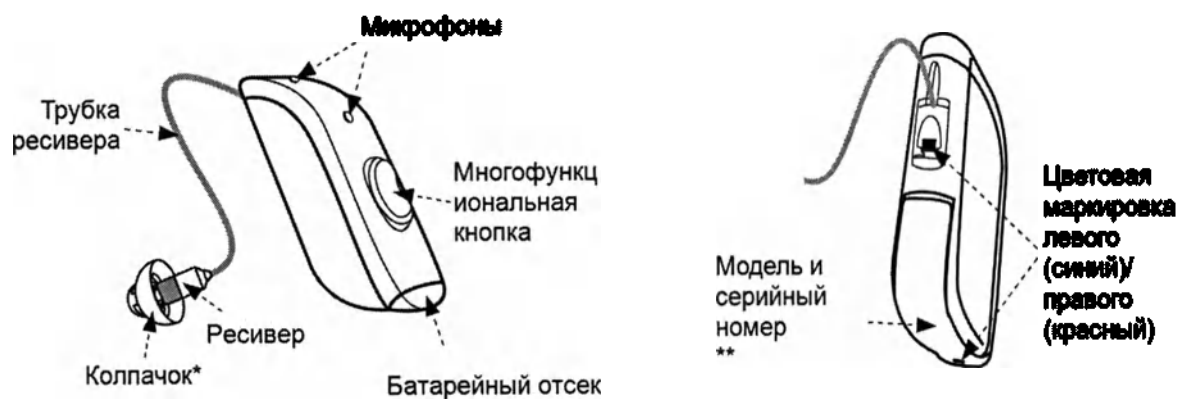

*На иллюстрации изображен открытый вкладыш. Используемый вами вкладыш может выглядеть иначе. **Внутри батарейного отсека.

Ушные вкладыши и колпачки

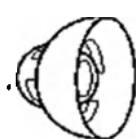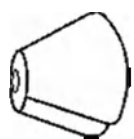

Вкладыш-тюльпан вкладыш

вкладыш

вкладыш

ый вкладыш

Закрытый


Открытый

Мощный

Специализированный

Все вкладыши — светло-серые.

Ресиверы

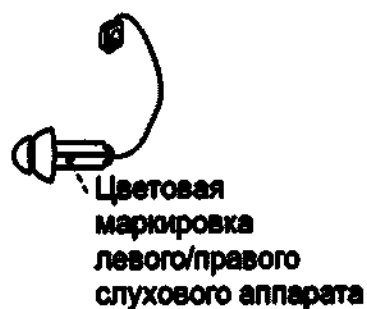

У ресивера может быть микрофон, как показано здесь.

Ваши слуховые аппараты отмечены цветовой маркировкой. Левый = синий. Правый = красный.

Спортивный замок



Спортивный замок удерживает слуховые аппараты на месте, когда вы активно двигаетесь.

Подготовка слуховых аппаратов к использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Ни в коем случае не кладите элемент питания в рот.
- Храните элемент питания для слуховых аппаратов вне досягаемости от домашних животных, детей и лиц с нарушениями умственного развития, когнитивных функций и психического здоровья.
- Ни в коем случае не проглатывайте элемент питания и не помещайте его внутрь тела, так как это может привести к серьезным травмам. При проглатывании элемента питания или попадании в любую часть тела немедленно обратитесь к врачу.
- Элементы питания вредны для окружающей среды. Поэтому, ни в коем случае не пытайтесь их сжечь — утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с региональными нормативными требованиями или верните их специалисту-сурдологу.

ВНИМАНИЕ:

- Элементы питания могут протекать. Если вы не планируете использовать слуховые аппараты в течение нескольких дней, НЕОБХОДИМО извлечь из них элемент питания.
- Утечка из элемента питания может стать причиной химических ожогов. В случае контакта с веществом, вытекающим из элемента питания, незамедлительно ополосните теплой водой затронутый участок. В случае появления химических ожогов, покраснения или раздражения на коже необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Ни в коем случае не пытайтесь зарядить воздушно-цинковый элемент питания, поскольку это может привести к утечке или небольшому взрыву.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте новый элемент питания, минимальный срок годности которых составляет один год.

Установка элемента питания в слуховой аппарат

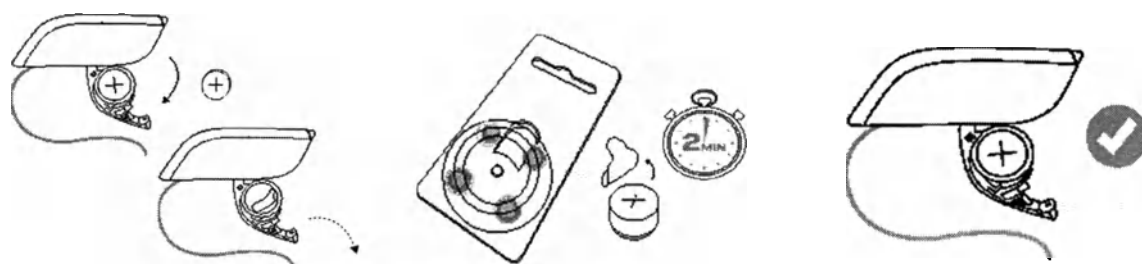

1. Откройте крышку батарейного отсека, поддев ногтем. Извлеките старую батарейку (если она установлена)

2. Снимите с новой батарейки упаковку и ее защитную фольгу. Подождите 2 минуты, пока активируется батарейка.

3. Вставьте новую батарейку в крышку батарейного отсека, надлежащим образом разместив сторону батарейки, обозначенную знаком «плюс» (+). Не вставляйте батарейку непосредственно в слуховой аппарат.

4. Закройте крышку батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы сэкономить ресурс элемента питания, выключайте слуховые аппараты, если они не используются.
- На ночь слуховые аппараты необходимо выключать. Полностью откройте крышку батарейного отсека, чтобы обеспечить возможность испариться накопившейся за день влага и продлить срок службы слуховых аппаратов.

Сигнал низкого заряда элемента питания

Если элемент питания разряжен, каждые 15 минут громкость в слуховых аппаратах будет кратковременно снижаться и будет проигрываться мелодия, пока не прекратится подача питания. Затем слуховые аппараты отключатся.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда имейте под рукой запасной элемент питания.

Сигнал низкого заряда элемента питания при сопряжении с беспроводными аксессуарами

ПРИМЕЧАНИЕ:

Элемент питания разряжаются быстрее, если используются функции, работающие по беспроводной связи, например, потоковая передача аудиоданных с мобильного устройства или

телевизора посредством нашего ТВ-стримера. По мере уменьшения заряда элемента питания, постепенно отключаются функции, работающие по беспроводной связи. В качестве индикатора низкого заряда элемента питания каждые пять минут будет звучать короткая мелодия.

В таблице внизу показаны функциональные возможности при разных уровнях заряда элемента питания.

Уровень заряда батарейки	Сигнал	Слуховой аппарат	Пульт управления	Потоковая передача данных
Устройство полностью заряжено		Р	Р	Р
Низкий уровень заряда батарейки	 4 одинаковых звуковых сигнала	Р	Р	Х
Элемент питания разряжен	 3 одинаковых звуковых сигнала и 1 длинный звуковой сигнал	Р	Х	Х

Они снова начинают работать после установки новой батарейки.


Размещение слуховых аппаратов в ушах

Как различать правый и левый слуховые аппараты

Левый слуховой аппарат (синяя маркировка)



Правый слуховой аппарат (красная маркировка)

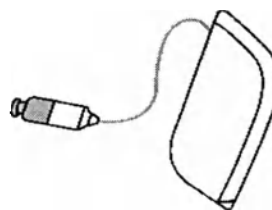


⚠ ВНИМАНИЕ: Если у вас два слуховых аппарата, они могут быть запрограммированы по-разному. Не меняйте их местами, так как это может повредить слух.

Ваши слуховые аппараты отмечены цветовой маркировкой. Левый = синий. Правый = красный. Если у ваших слуховых аппаратов нет цветовой маркировки, попросите специалиста-сурдолога нанести ее.

Размещение вкладыша ресивера в ухе


Если на ваших слуховых аппаратах установлены колпачки, следуйте этим инструкциям:

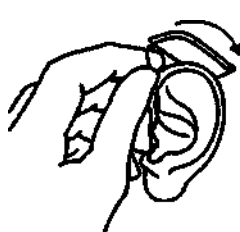

1. Установите слуховой аппарат сверху на ухо.



2. Удерживая трубочку ресивера в месте сгиба, осторожно разместите вкладыш ресивера в ушном канале, аккуратно продвинув вкладыш ресивера в ушной канал.

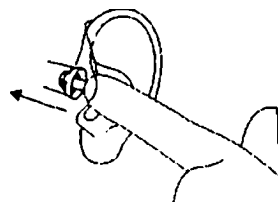

3. Разместите вкладыш достаточно глубоко в ушном канале таким образом, чтобы расположить провод вплотную к голове. Чтобы проверить расположение, воспользуйтесь зеркалом.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание появления свиста важно, чтобы провод и вкладыш были правильно установлены в ухо. Если свист будет по-прежнему слышен, посмотрите в руководстве по устранению неполадок, какие еще причины могут быть у этого явления, и как их устранить.

Спортивный замок

Если вы очень активно двигаетесь, слуховые аппараты могут сместиться из надлежащего положения. Чтобы этого не случилось, специалист-сурдолог может прикрепить к ресиверу спортивный замок и отрегулировать его.

Чтобы разместить слуховой аппарат со спортивным замком:

1. Разместите слуховой аппарат в ухе как обычно
2. Продвиньте спортивный замок в нижнюю часть ушной раковины (часть уха, находящаяся непосредственно перед ушным каналом).



И **ПРИМЕЧАНИЕ:** Со временем спортивные замки могут стать жесткими или хрупкими, а их цвет может измениться. Для выполнения замены обратитесь к специалисту-сурдологу. Специалист-сурдолог поможет вам выполнить замену.

Размещение ушных вкладышей в ушах



1. Удерживая ушной вкладыш большим и указательным пальцами, разместите его в ухе, направив звуковой выход в ушной канал.



2. Аккуратными вращательными движениями продвиньте ушной вкладыш в ухо. Двигайте ушной вкладыш вверх-вниз и осторожно нажмите на него. Чтобы облегчить процедуру размещения слухового аппарата в ухе, можно открывать и закрывать рот.



3. Разместите слуховой аппарат за ухом так, чтобы он был надежно закреплён. Если слуховые аппараты размещены правильно, они сидят плотно, не причиняя дискомфорта.





ПРИМЕЧАНИЕ: При установке вкладыша может помочь оттягивание уха вверх и назад противоположной рукой.

Извлечение слуховых аппаратов из ушей

Извлечение вкладышей ресивера из ушей

Если на ваших слуховых аппаратах установлены колпачки, следуйте этим инструкциям:

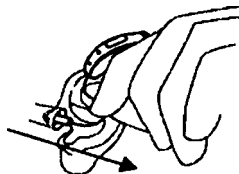
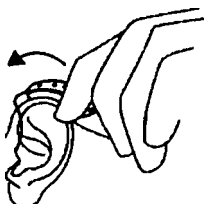


1. Приподнимите слуховой аппарат над ухом.

2. Удерживая провод ресивера в месте сгиба большим и указательным пальцами, извлеките вкладыш из ушного канала

Извлечение ушных вкладышей из ушей

Если на ваших слуховых аппаратах установлены ушные вкладыши, следуйте этим инструкциям:

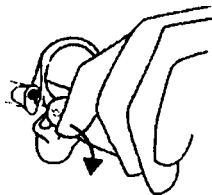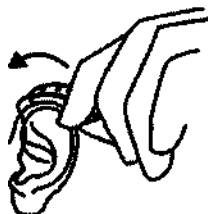

1. Приподнимите слуховой аппарат за ухом. Оставьте его ненадолго повисеть возле уха.

2. Возьмите ушной вкладыш большим и указательным пальцами и аккуратно выньте его (но только не сам слуховой аппарат, не провод,) из уха. Если на ушном вкладыше есть канатик для извлечения аппарата, аккуратно потяните за этот канатик. Канатик для извлечения аппарата фиксируется на ушном вкладыше по запросу пользователя слухового аппарата. Полностью извлеките вкладыш, аккуратно выполняя вращательные движения.

Использование слуховых аппаратов

Включение и выключение слуховых аппаратов

ON



Чтобы включить слуховой аппарат, закройте крышку батарейного отсека.

OFF



Чтобы выключить слуховой аппарат, откройте крышку батарейного отсека (подденьте ее ногтем).

Smart Start

Smart Start обеспечивает задержку включения слухового аппарата после закрытия крышки батарейного отсека. Если активирована эта функция, каждая секунда задержки (5- или 10-секундная задержка) сопровождается звуковым сигналом.

Smart Start задерживается, когда звук проходит через слуховой аппарат. Это даст вам время, чтобы надеть слуховой аппарат без появления свиста или других проблем.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не хотите использовать эту функцию, попросите специалиста-сурдолога отключить ее.

Акустические программы

Ваш специалист-сурдолог может активировать одну или несколько акустических программ в слуховых аппаратах. Эти программы могут помочь вам в определенных ситуациях. Узнайте у специалиста-сурдолога, какие программы могут быть полезными для вас.

Программы	Использование
All-Around	Лучший вариант, если вы хотите использовать только одну программу.
Ресторан	Программа для использования в шумных местах, например, в ресторанах или на общественных мероприятиях.
Музыка	Программа для использования во время прослушивания музыки.
Акустический телефон	Специальная программа для использования во время телефонных разговоров.
На улице	Для использования вне помещений.
Телефон с индукционной катушкой + Микрофон	Программа для использования в случае, если вы пользуетесь телефоном с индукционной катушкой.
Индукционная катушка + Микрофон	Для использования в местах, где есть система индукционной петли, например, в театрах и храмах.
Передний фокус / Ультра фокус	Программа для использования только в очень шумных местах (более сфокусированная, чем программа «Ресторан»).

Приложения

У нас есть несколько приложений, которые вы можете использовать для управления слуховыми аппаратами. Вы можете использовать эти приложения для того, чтобы регулировать громкость, переключать программы и выполнять потоковую передачу аудиоданных с другого устройства. См. "Дополнительные опции", стр. 36.

Использование кнопки программ



Модели «312» оснащены кнопкой программ.

Нажмите эту кнопку, чтобы переключить программу с одной на другую. В подтверждение переключения программы в слуховых аппаратах подается звуковой сигнал. Количество звуковых сигналов обозначает то, какую программу вы выбрали.

- Чтобы вернуться к заданной по умолчанию акустической программе, пролистайте до нее или выключите слуховые аппараты, а затем снова включите их.




ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас два слуховых аппарата, на которых активирована синхронизация, при переключении программы в одном слуховом аппарате автоматически переключается программа и во втором слуховом аппарате.

Потоковая передача звука в ваши слуховые аппараты

Нажмите на кнопку и удерживайте ее нажатой в течение трех секунд.

Слуховые аппараты начнут выполнять потоковую передачу звука с выбранного вами аудиоустройства.

Прежде чем вы сможете начать потоковую передачу аудиоданных в слуховые аппараты, вы должны выполнить их сопряжение с аудиоустройством. Более подробную информацию о том, как это сделать, можно найти в инструкциях по использованию вашего аудиоустройства.

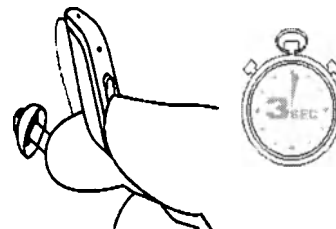

Использование многофункциональной кнопки



В моделях «13» предусмотрена многофункциональная кнопка.

Эта кнопка называется многофункциональной, потому что она выполняет несколько функций — с ее помощью можно регулировать громкость, переключать программы и активировать потоковую передачу аудиоданных.

Переключение программ

- Чтобы переключить программу, нажмите верхнюю кнопку и удерживайте ее нажатой в течение трех секунд. В подтверждение переключения программы в слуховых аппаратах подается звуковой сигнал. Количество звуковых сигналов обозначает то, какую программу вы выбрали.

- Продолжайте нажимать эту кнопку, чтобы пролистать все имеющиеся программы.

- Чтобы вернуться к заданной по умолчанию акустической программе, пролистайте до нее или выключите слуховые аппараты, а затем снова включите их.





ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас два слуховых аппарата, на которых активирована синхронизация, при переключении программы в одном слуховом аппарате автоматически переключается программа и во втором слуховом аппарате.

Эту функцию также можно настроить таким образом, чтобы использовать один слуховой аппарат для увеличения громкости, а второй — для уменьшения громкости. Любое увеличение или уменьшение громкости, выполненное на одном слуховом аппарате, также выполняется и на втором, чтобы громкость была одинаковой на обоих слуховых аппаратах.

Специалист-сурдолог может изменить заданные по умолчанию настройки этой кнопки и указать новые настройки в таблице ниже:

Действие, выполняемое кнопкой	Настройка по умолчанию	Новая настройка
Короткое нажатие верхней кнопки	Увеличение громкости	
Короткое нажатие нижней кнопки	Уменьшение громкости	
Длительное нажатие верхней кнопки (3 секунды)	Переключение программ	
Длительное нажатие нижней кнопки (3 секунды)	Активация потоковой передачи аудиоданных	

Регулировка громкости

Если специалист-сурдолог активировал функцию регулировки громкости, следуйте этим инструкциям:



Чтобы увеличить громкость, кратковременно нажмите верхнюю часть кнопки.

Чтобы уменьшить громкость, кратковременно нажмите на нижнюю часть кнопки.

Потоковая передача звука в ваши слуховые аппараты

Нажмите на нижнюю часть кнопки и удерживайте ее нажатой в течение секунд. Слуховые аппараты начнут выполнять потоковую передачу звука с выбранного вами аудиоустройства.



трех

Прежде чем вы сможете начать потоковую передачу аудиоданных в слуховые аппараты, вы должны выполнить их сопряжение с аудиоустройством. Более подробную информацию о том, как это сделать, можно найти в инструкциях по использованию вашего аудиоустройства.

Индукционная катушка (опция)

Ваш слуховой аппарат может быть оснащен индукционной катушкой. Функция индукционной катушки может улучшить разборчивость речи при использовании с совместимыми со слуховым аппаратом телефонами, а также в театрах, кинотеатрах, церквях и других общественных местах, где установлены системы индукционной петли.

При включении функции индукционной катушки ваш слуховой аппарат принимает сигналы от системы индукционной петли или телефона, совместимого со слуховыми аппаратами.

Специалист-сурдолог может активировать программу индукционной катушки.

Некоторые смартфоны совместимы со слуховыми аппаратами. Телефон, совместимый со слуховыми аппаратами, формирует небольшую индукционную петлю, к которой могут подключиться ваши слуховые аппараты. Индукционная катушка принимает сигнал телефона, совместимого со слуховыми аппаратами, и преобразует его в звук.


1 ПРИМЕЧАНИЕ:

Индукционная катушка не может работать без системы индукционной петли или телефона, совместимого со слуховыми аппаратами.

- Если вы плохо слышите при использовании индукционной катушки, попросите специалиста-сурдолога перенастроить эту функцию.
- Если при наличии системы индукционной петли и при условии активации функции индукционной катушки в слуховых аппаратах нет звука, это может означать, что система индукционной петли не включена или не работает надлежащим образом.
- Звуки от индукционной петли и микрофонов слуховых аппаратов могут быть скомбинированы в соответствии с вашими предпочтениями. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту-сурдологу.
- Если вы хотите выключить функцию индукционной катушки, переключитесь на другую акустическую программу.

Использование телефона

Ваш слуховой аппарат позволяет вам использовать телефон привычным способом. Некоторым пользователям слуховых аппаратов необходимо попрактиковаться, прежде чем они смогут определить для себя оптимальное положение телефона.

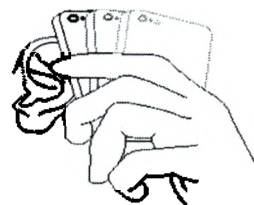

В этом могут помочь нижеперечисленные рекомендации:

1. Поднесите телефон к ушному каналу или микрофону слухового аппарата, как показано на иллюстрации.
2. Если вы слышите свист, попробуйте поддержать телефон в одном и том же положении в течение нескольких секунд. Слуховой аппарат может выполнить подавление свиста.
3. Также можно попробовать поддержать телефон на небольшом расстоянии от уха

I ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вам не удастся добиться удовлетворительных результатов при использовании мобильного телефона, специалист-сурдолог может порекомендовать вам определенные беспроводные аксессуары, которые улучшают качество общения по мобильному телефону. См. также "Беспроводные аксессуары", стр. 57.
- В зависимости от ваших потребностей, специалист-сурдолог может активировать программу, специально предназначенную для использования телефона.
- Если у вас есть мобильное устройство, вы можете выполнить его сопряжение, чтобы подключить его напрямую к вашим слуховым аппаратам. См. "Дополнительные опции", стр. 36.

Мобильные телефоны

Ваши слуховые аппараты соответствуют строжайшим стандартам международной электромагнитной совместимости. Могут возникать помехи различной интенсивности, которая зависит от особенностей вашего мобильного телефона или работы провайдера услуг беспроводной связи.

Дополнительные опции

Использование слуховых аппаратов с iPhone, iPad и iPod touch (опция)

В слуховых аппаратах предусмотрена функция Made for iPhone, iPad и iPod touch, которая позволяет осуществлять прямую потоковую передачу аудиоданных, в том числе выполнение hands-free телефонных звонков с новейшими моделями iPhone и iPad, и для управления с помощью этих мобильных устройств.

Потоковая передача аудиоданных со смартфона на базе Android

Некоторые смартфоны Android могут осуществлять потоковую передачу аудиоданных напрямую в ваши слуховые аппараты.

Ваше устройство должно работать на ОС Android 10 или новее и должно иметь функцию потоковой передачи данных с Android для слуховых аппаратов (ASHA).

I ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения помощи в сопряжении и использовании этих устройств со слуховыми аппаратами, пожалуйста, обратитесь к специалисту-сурдологу.

Hands-free звонки совместимы с iPhone 11 или более поздней версии, iPad Pro 12,9 дюйма (5-е поколение), iPad Pro 11 дюймов (3-е поколение), iPad Air (4-е поколение) и iPad mini (6-е поколение) с обновлениями программного обеспечения iOS 15.3 и iPadOS 15.3 или более поздней версии.

Управление слуховым аппаратом с помощью мобильного приложения (опция)

Наше приложение ReSound Smart 3D осуществляет отправку и прием сигналов от слуховых аппаратов посредством смартфонов.

- С вашими слуховыми аппаратами используйте только наше приложение ReSound Smart 3D™.
- Не отключайте уведомления в приложении.
- Устанавливайте обновления для того, чтобы поддерживать надлежащее функционирование приложения.
- Чтобы получить печатную версию руководства пользователя для мобильных приложений, воспользуйтесь информацией на последней странице этого руководства пользователя или обратитесь в службу поддержки клиентов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения помощи в сопряжении и использовании этих устройств со слуховыми аппаратами, обратитесь к специалисту-сурдологу или посетите наш веб-сайт, на котором приведена необходимая информация.
- Если ваш смартфон на базе Android с поддержкой Bluetooth не выполняет потоковую передачу звука напрямую в слуховые аппараты, вы можете использовать ReSound Phone Clip+ для потоковой передачи звука.

ReSound Assist и ReSound Assist Live (опция)

ReSound Assist

Если вы зарегистрировались для использования функции ReSound Assist, доступной для ваших слуховых аппаратов, вы можете разрешить дистанционную настройку ваших слуховых аппаратов без необходимости посещать специалиста-сурдолога.

Все, что для этого необходимо,— это совместимое мобильное устройство с доступом в сеть Интернет. Это позволяет:

- Вы можете дистанционно запросить настройку ваших слуховых аппаратов в соответствии с вашими потребностями.
- Чтобы оптимизировать работу ваших слуховых аппаратов, вы можете обновлять их, используя новейшие версии программного обеспечения.

Данная услуга доступна, только если ваше мобильное устройство подключено к сети Интернет. Специалист-сурдолог предоставит вам информацию об этой опции и о том, как она работает с приложением ReSound Smart 3D.

Чтобы обновление прошло максимально эффективно, перед тем как выполнить его, убедитесь, что слуховые аппараты подключены к приложению ReSound Smart 3D и находятся возле смартфона или планшета (iPhone, iPad, iPod touch или Android).

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе установки и обновления слуховые аппараты отключаются.

ReSound Assist Live

Эта услуга также включает в себя ReSound Assist Live. Пользуясь этой услугой, вы можете получить индивидуальную помощь специалиста-сурдолога, не выходя из дома.

Phone Now (опция)

Если разместить на телефонной трубке специальный магнит, в слуховых аппаратах автоматически включится программа телефона, когда телефонная трубка будет находиться возле уха.

Если пользователь убирает телефонную трубку от уха, слуховые аппараты автоматически переключаются обратно на предыдущую программу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Попросите специалиста-сурдолога активировать Phone Now в ваших слуховых аппаратах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Проглатывание магнита может нанести вред здоровью. В случае проглатывания магнита необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Храните магниты вне досягаемости от домашних животных, детей и лиц с нарушениями умственного развития, когнитивных функций и психического здоровья.
- Магнит Phone Now может отрицательно повлиять на работу высокочувствительных медицинских устройств/электронных систем. Если вы используете функцию Phone Now вблизи подобных высокочувствительных приборов/оборудования (например, кардиостимуляторов и дефибрилляторов), вам необходимо обратиться к их производителю для получения рекомендаций касательно надлежащих мер безопасности, которые необходимо соблюдать в такой ситуации. Если изготовитель не может предоставить соответствующие рекомендации, мы советуем держать магнит или телефон, оснащенный магнитом, на расстоянии 30 см (12 дюймов) от устройств, чувствительных к воздействию магнитного поля (например, кардиостимуляторов).

Размещение магнита Phone Now


Разместите магнит на телефонной трубке следующим образом:



1. Тщательно очистите поверхность. Используйте рекомендуемое очищающее

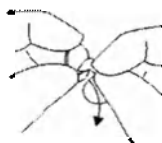

средство.
2. Снимите фольгу с магнита.

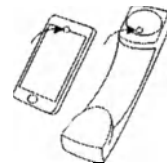

3. Разместите магнит на телефоне.

- Если в ваших слуховых аппаратах активирована функция Comfort Phone, в момент, когда телефон подносится к уху, в слуховом аппарате на втором ухе автоматически уменьшается громкость звука.
- Не закрывайте магнитом отверстие динамика на телефоне.
- Если использование этой функции не приносит удовлетворительного результата, переместите магнит в другое положение, чтобы сделать процесс общения более простым и комфортным.
- Если слуховые аппараты не переключаются на программу телефона каждый раз в случае необходимости, попробуйте изменить местоположение магнита или добавить дополнительные магниты.

Авиарежим / Режим отключения беспроводной связи (опция)

Ваши слуховые аппараты могут принимать беспроводные сигналы. Например, ими можно управлять посредством мобильного устройства или пульта дистанционного управления. Между вашими слуховыми аппаратами также может происходить обмен информацией. Однако в некоторых местах необходимо отключать беспроводную связь.



ВНИМАНИЕ:

- Этот слуховой аппарат оснащен радиочастотным передатчиком. При посадке в самолет следуйте установленным авиакомпанией предписаниям и выключите функцию беспроводной связи в слуховых аппаратах в необходимый момент и необходимым способом.
- В ситуациях, когда это необходимо, выключайте функцию беспроводной связи в слуховых аппаратах.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны выполнить нижеуказанные действия для обоих слуховых аппаратов, даже если активирована функция синхронизации.

Отключение беспроводной связи (активация авиарежима)

1. Откройте и закройте крышку батарейного отсека на каждом слуховом аппарате три раза в течение 10 секунд.
2. При переключении слухового аппарата в авиарежим звучит 10-секундный двойной тон (" "). После активации авиарежима необходимо подождать еще 15 секунд, прежде чем снова открывать и закрывать батарейный отсек по какой-либо причине. Если крышку батарейного отсека открыть и закрыть в этот 15-секундный период, беспроводная связь снова активируется.

Активация беспроводной связи (отключение Авиа режима)

1. Один раз откройте и закройте крышку батарейного отсека на каждом слуховом аппарате.
2. Режим беспроводной связи будет активирован в течение 10 секунд.

Очистка слуховых аппаратов и уход за ними

Инструменты для очистки

В комплекте со слуховыми аппаратами поставляются следующие инструменты для очистки:



1. Мягкая тряпочка.
2. Щеточка с магнитом для батарейки.

Специалист-сурдолог может предоставить вам набор серных фильтров.

Общие инструкции по уходу и техническому обслуживанию

И **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы обеспечить высокое качество использования ваших слуховых аппаратов и максимально продлить их срок службы, необходимо очищать слуховые аппараты и проводить мероприятия по уходу за ними.

Поддерживать слуховые аппараты в идеальном рабочем состоянии легко. Просто выполняйте следующее:

1. После извлечения слуховых аппаратов выключите их, полностью открыв крышку батарейного отсека. Это помогает их просушить.
2. После извлечения слуховых аппаратов протрите их мягкой тряпочкой, чтобы они были чистыми и сухими.
3. Если вы используете поглотитель влаги, используйте только рекомендуемые средства.
4. Наносите косметику, духи, лосьон после бритья, лак для волос, лосьоны и т. д. **ПЕРЕД** тем, как надеть слуховые аппараты. Эти средства могут повредить слуховые аппараты или изменить их цвет.
5. Ни в коем случае не погружайте слуховой аппарат в жидкость.
6. Не подвержайте слуховые аппараты воздействию чрезмерно высоких температур и прямых солнечных лучей.
7. Не плавайте, не принимайте душ и не посещайте баню/сауну в слуховых аппаратах.
8. Устройство сертифицировано по стандарту IP68 для защиты от воды и пыли:
 - Устройство имеет степень защиты IP6X от проникновения пыли. Не допускайте попадания на устройство большого количества пыли.
 - Устройство имеет степень защиты IPX8 от проникновения воды. Избегайте контакта устройства с водой. Не плавайте, не принимайте душ и не посещайте сауну во время ношения устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ:


• Наличие на слуховых аппаратах ушной серы или других загрязнений может стать причиной возникновения инфекции. Во избежание этого очищайте слуховые аппараты согласно инструкциям.

Ежедневный уход и техническое обслуживание

Важно ежедневно поддерживать слуховые аппараты в чистом и сухом состоянии. Используйте инструменты для очистки, поставляемые в комплекте.



1. Протрите слуховые аппараты тряпочкой.

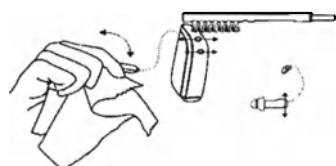

2. Аккуратно проведите щеточкой по микрофонам. Если ресивер оснащен микрофоном, его тоже необходимо очистить щеточкой

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ни в коем случае не допускайте попадания очистительной проволоки или ворсинок щеточки во входные отверстия микрофона. Это может повредить слуховые аппараты.
- Не используйте воду для очистки трубочек ресивера или вкладышей.
- Протирайте ресиверы и вкладыши мягкой, сухой тряпочкой.

Очистка, дезинфекция

Наденьте одноразовые нитриловые перчатки.

Смочите мягкую ткань 70-90 % - ным спиртовым раствором (изопропиловый, метиловый или этиловый спирт) с 10-30% - ной очищенной водой.

Тщательно протрите слуховой аппарат тканью до тех пор, пока не останется никаких следов грязи. Затем выбросьте тряпку в мусорное ведро.

Возьмите новую тряпку и смочите ее спиртовым раствором. Аккуратно очистите слуховой аппарат еще раз, в течение 60 секунд, убедившись, что все поверхности очищены спиртовым раствором.

Не погружайте слуховой аппарат в спиртовой раствор или любую другую жидкость.

Выбросьте тряпку и перчатки в мусорное ведро.

Поместите слуховой аппарат на чистую поверхность на несколько минут до полного высыхания.

Важно ежедневно поддерживать слуховые аппараты в чистом и сухом состоянии. Используйте инструменты для очистки, поставляемые в комплекте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прижимайте с силой волоски щеточки к входам, так как это может привести к повреждению микрофонов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте проволочную петлю для очистки входных отверстий микрофона. Если входные отверстия микрофона остались засоренными после очистки наружной поверхности щеточкой, попросите специалиста-сурдолога помочь вам очистить их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проволочная петля предназначена только для ушных вкладышей.

Замена вкладышей в слуховых аппаратах

Мы рекомендуем, чтобы специалист-сурдолог показал вам, как менять вкладыши. Вкладыши необходимо менять раз в 3 месяца или чаще, в зависимости от рекомендаций специалиста-сурдолога. Неправильная замена вкладыша может привести к тому, что он останется в ухе при извлечении слухового аппарата.

ВНИМАНИЕ:

- Если вы подозреваете, что вкладыш застрял у вас в ухе, обратитесь к специалисту-сурдологу. Эти предметы могут нанести вред и стать причиной возникновения инфекции в ухе.
- Используйте только аксессуары, предназначенные для использования с вашими слуховыми аппаратами. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.

Стандартные вкладыши

На иллюстрациях изображен открытый вкладыш, но процедура одинакова и для всех остальных вкладышей. Чтобы заменить вкладыши, следуйте этим инструкциям.



1. Извлеките использованный вкладыш, сняв его с ресивера, и утилизируйте его. Возможно, потребуется приложить усилие.



2. Наденьте новый вкладыш на рельефный край ресивера.



3. Убедитесь, что вкладыш установлен правильно. Для этого аккуратно приподнимите нижнюю часть вкладыша и проверьте, полностью ли кайма вкладыша закрывает рельефный край ресивера.



4. При правильном размещении кажется, что вкладыш расположен немного под углом.


Вкладыш-тюльпан

Чтобы выполнить замену вкладыша-тюльпана, следуйте этим инструкциям:




1. Извлеките использованный вкладыш, сняв его с ресивера, и утилизируйте его.

Возможно, потребуется приложить усилие

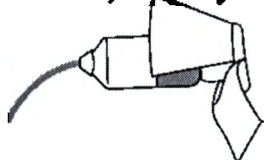

2. Отодвиньте самый большой лепесток, затем прижмите вкладыш-тюльпан к ребристому краю ресивера.

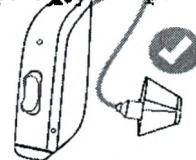

3. Убедитесь в правильности установки вкладыша-тюльпана, проверив, полностью ли кайма вкладыша закрывает ребристый край ресивера



4. Сдвиньте большой сегмент вперед.

На этой иллюстрации изображен правильно установленный вкладыш-тюльпан. Убедитесь в том, что большой лепесток находится снаружи маленького лепестка.

Замена серного фильтра

Серный фильтр предотвращает контакт ушной серы с компонентами слухового аппарата. Серный фильтр необходимо регулярно менять. Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом по поводу того, как часто это необходимо делать. Это зависит от того, сколько ушной серы образуется у вас в ушах.



Если вы носите вкладыш, снимите его, прежде чем выполнять замену серного фильтра. Вам понадобится коробка с инструментами для замены серных фильтров.

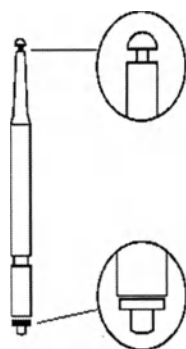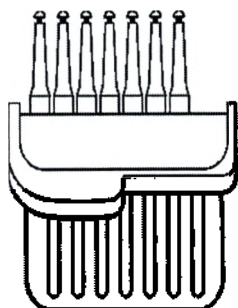

Коробка с 8 инструментами для замены серных фильтров.



Инструмент для установки и извлечения серных фильтров выполняет две функции: извлечение отработанных серных фильтров и их замена на новые серные фильтры.

Извлечение старого серного фильтра

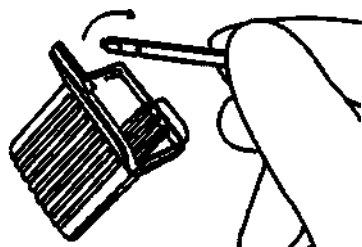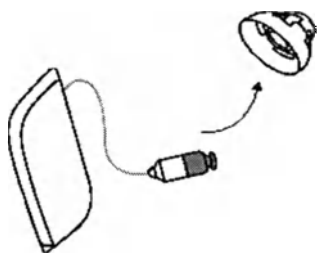

1. Снимите вкладыш с ресивера.

2. Откройте футляр с серными фильтрами и достаньте один из инструментов для их замены. У каждого инструмента есть маленький крючок с одной стороны и новый серный фильтр с другой.

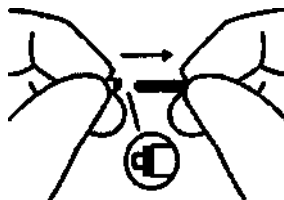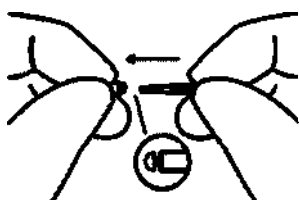


3. Вставьте наконечник для удаления в использованный серный фильтр, а затем сразу же вытащите его наружу. Важно вытянуть инструмент, удерживая его прямо, а не под углом.


Установка нового серного фильтра



1. Вставьте другой конец инструмента в звуковой выход (конец со сменным фильтром).

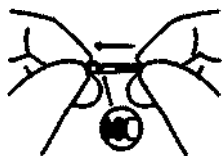


2. Аккуратно вдавливайте заменяемый элемент прямо в звуковой выход, пока его внешнее кольцо не коснется звукового выхода.

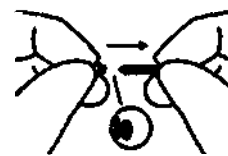

3. Извлеките инструмент, удерживая его прямо, и новый серный фильтр останется в нужном месте. Установите на место старый или новый вкладыш

Хранение слуховых аппаратов

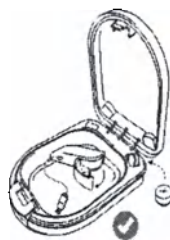

1. Самое лучшее место для хранения слуховых аппаратов — это футляр, с которым они поставлялись.
2. Если слуховые аппараты не используются, поддерживайте их в сухом состоянии, оставляя открытыми крышки батарейного отсека.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Ни в коем случае не кладите батарейку из слухового аппарата в рот.
- Храните батарейки для слуховых аппаратов вне досягаемости от домашних животных, детей и лиц с нарушениями умственного развития, когнитивных функций и психического здоровья.
- Ни в коем случае не проглатывайте батарейки и не помещайте их внутрь тела, так как это может привести к серьезным травмам. При проглатывании батарейки или попадании в любую часть тела немедленно обратитесь к врачу.

Беспроводные аксессуары

Экосистема наших беспроводных устройств включает в себя широкий ассортимент беспроводных аксессуаров, слаженно функционирующих совместно со слуховыми аппаратами. Использование таких аксессуаров позволяет осуществлять потоковую передачу высококачественных стереозвуков и речи напрямую в слуховые аппараты.

Доступные беспроводные аксессуары и их характеристики

- **ТВ-стример** осуществляет потоковую передачу аудио из телевизора и большинства других источников аудио в ваши слуховые аппараты, поддерживая необходимый вам уровень громкости.
- **Базовый пульт дистанционного управления** регулирует громкость, отключает звук в слуховых аппаратах и переключает программы.
- **Пульт дистанционного управления с расширенными возможностями** регулирует громкость, отключает звук в слуховых аппаратах, переключает программы и отображает настройки.
- **Phone clip** осуществляет потоковую передачу телефонных разговоров и стереозвуков в оба слуховых аппарата, а также может использоваться в качестве пульта управления.
- **Выносной микрофон** представляет собой микрофон, который носит собеседник. Его использование значительно улучшает понимание речи в условиях шума.
- **Беспроводной выносной микрофон** работает как настольный микрофон, а также может использоваться в качестве настольного микрофона. Кроме того, он имеет встроенную индукционную катушку, которая позволяет подключаться к системе индукционной петли, коннектору для FM-приемника и входу с мини-джек разъемом для проводной потоковой передачи аудиоданных с компьютера или музыкального плеера.
- **Приложение**, которое можно установить на мобильное устройство для потоковой передачи данных и управления аппаратами непосредственно с мобильного устройства. См. "Дополнительные опции", стр. 36.

Получение доступа к беспроводным аксессуарам

Чтобы получить доступ к беспроводному устройству, которое уже сопряжено со слуховыми аппаратами, нажмите и удерживайте кнопку программ максимум 2 секунды. Слуховой аппарат издаст звук для подтверждения соединения.

Информацию о том, как выполнить сопряжение слуховых аппаратов с беспроводным аксессуаром, см. в руководстве по использованию соответствующего беспроводного аксессуара.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, обратитесь к специалисту-сурдологу, чтобы ознакомиться с совместимыми беспроводными аксессуарами, одобренными GN ReSound A/S.
- С вашими беспроводными слуховыми аппаратами вы должны использовать только ReSound беспроводные аксессуары.

Управление тиннитусом

Модуль Tinnitus Sound Generator

Ваш слуховой аппарат ReSound оснащен модулем Tinnitus Sound Generator (TSG) — средством, генерирующим звуки, которые используются в программах по борьбе с тиннитусом с целью временного облегчения его симптомов. TSG может генерировать звуки, соответствующие определенным терапевтическим целям или вашим личным предпочтениям, и используется по назначению врача, аудиолога или специалиста-сурдолога. В зависимости от выбранной программы слухового аппарата и среды, в которой вы находитесь, вы иногда будете слышать терапевтические звуки, которые напоминают постоянный или прерывистый шум.

Показания для использования модуля TSG

Модуль Tinnitus Sound Generator — это устройство, генерирующее звуки, которые используются в рамках программы управления тиннитусом для временного облегчения состояния пациентов, страдающих тиннитусом. Целевую категорию населения составляют взрослые в возрасте старше 18 лет. Кроме того, данное изделие можно использовать для детей в возрасте от 12 лет и старше. Однако дети и лица с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития должны быть обучены процедуре размещения и извлечения слухового аппарата с модулем TSG. Обучение этой процедуре должен выполнять врач, аудиолог, специалист-сурдолог или опекун.

Для медицинских работников

Модуль Tinnitus Sound Generator используется медицинскими работниками, которые специализируются на лечении пациентов с тиннитусом и обычными нарушениями слуха. Первоначальная настройка модуля

Tinnitus Sound Generator должна быть выполнена сурдологом, участвующем в программе по борьбе с тиннитусом, в ходе очного приема. Если специалист-сурдолог сочтет это целесообразным, последующую настройку модуля Tinnitus Sound Generator можно выполнить дистанционно в режиме реального времени, при этом обмениваясь информацией посредством аудио, видео и чата в специальном пользовательском приложении.

Инструкции по использованию модуля TSG

Описание устройства

Модуль Tinnitus Sound Generator (TSG) — это программное средство, генерирующее звуки, которые используются в программах для борьбы с тиннитусом с целью временного облегчения его симптомов.

Принцип работы устройства

Модуль TSG — это устройство, генерирующее частотно-амплитудный белый шум. Уровень сигнала шума и частотные характеристики могут регулироваться в соответствии с терапевтическими целями согласно назначению врача, аудиолога или специалиста-сурдолога.

Врач, аудиолог или специалист-сурдолог могут модулировать генерируемый шум для того, чтобы сделать его более комфортным для восприятия. Шум можно менять таким образом, чтобы он напоминал, к примеру, звук волн, набегающих на берег.

Скорость и уровень модуляции также можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Специалист-сурдолог может активировать дополнительную функцию, которая позволяет выбирать предварительно заданные звуки, имитирующие звуки природы, например, шум волн или текущей воды.

Если вы используете два беспроводных слуховых аппарата, которые поддерживают бинауральную синхронизацию, эту функцию может активировать специалист-сурдолог. При этом Tinnitus Sound Generator синхронизирует звук в обоих слуховых аппаратах.

Если тиннитус беспокоит вас только в условиях тишины, врач, аудиолог или специалист-сурдолог могут настроить модуль TSG таким образом, чтобы генерируемый им звук был слышен только в тишине. Общий уровень звука можно настраивать при помощи регулятора громкости, который является опциональным. Необходимость использования такого регулятора устанавливается совместно с врачом, аудиологом или специалистом-сурдологом.

На слуховых аппаратах с активированной функцией бинауральной синхронизации сурдолог также может активировать функцию синхронизации мониторинга окружения для того, чтобы уровень шума TSG, автоматически регулировался одновременно в обоих слуховых аппаратах в зависимости от уровня фоновых звуков. Помимо этого, если слуховой аппарат оснащен регулятором громкости, уровень окружающего шума отслеживается слуховым аппаратом, и регулятор громкости может одновременно использоваться для регулировки уровня генерируемого шума в обоих слуховых аппаратах.

Научные концепции, которые легли в основу функционирования устройства

Функция модуля TSG заключается в том, чтобы отвлечь от звука, возникающего при тиннитусе, нейтральным звуком, который пользователь может с легкостью игнорировать. Отвлечение внимания является важным компонентом большинства методов борьбы с тиннитусом, например, терапии привыкания к тиннитусу.

Генерируемый звук должен быть слышимым, поскольку это необходимо для привыкания к тиннитусу. Поэтому идеальная громкость модуля TSG должна быть настроена так, чтобы генерируемый звук начинал сливаться со звуком, возникающим при тиннитусе, и пользователь слышал и звук, возникающий при тиннитусе, и звук, производимый звуковым генератором.

В большинстве случаев модуль TSG также можно настроить таким образом, чтобы он маскировал звук, возникающий при тиннитусе, и обеспечивал пользователю временное облегчение, генерируя более комфортный и контролируемый звук.

Регулировка громкости TSG

Специалист-сурдолог настраивает звуковой генератор на определенный уровень громкости. При включении звукового генератора громкость устанавливается на данном оптимальном уровне. Поэтому регулировка громкости вручную может не понадобиться. Однако при помощи регулятора громкости пользователь может настраивать уровень громкости или интенсивность стимула в соответствии со своими предпочтениями. Громкость звукового генератора тиннитуса можно

регулировать только в диапазоне, заданном специалистом-сурдологом.

Регулятор громкости— это опция для модуля TSG, используемая для настройки уровня мощности звукового генератора.

Использование TSG с мобильными приложениями

Управление звуковым генератором тиннитуса посредством кнопок программ на слуховых аппаратах можно оптимизировать, используя беспроводное управление при помощи специального приложения TSG, устанавливаемого на смартфон или другое мобильное устройство. Эта возможность появляется в поддерживаемых слуховых аппаратах после того, как специалист-сурдолог активирует функцию TSG во время настройки слухового аппарата.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования мобильных приложений слуховой аппарат должен быть подсоединен к смартфону или другому мобильному устройству

TSG – Технические характеристики

Технология передачи аудиосигналов: цифровая.

Доступные звуки: сигнал белого шума, который может быть создан в следующих конфигурациях:

Фильтр высоких частот	Фильтр низких частот
500 Гц	2000 Гц
750 Гц	3000 Гц
1000 Гц	4000 Гц
1500 Гц	5000 Гц
2000 Гц	6000 Гц
-	8000 Гц

Возможна амплитудная модуляция сигнала белого шума с глубиной затухания до 14 дБ.

⚠ Использование данного устройства согласно медицинским предписаниям

Модуль TSG должен использоваться строго в соответствии с предписаниями врача, аудиолога или специалиста-сурдолога. Во избежание необратимой потери слуха максимальное время ежедневного использования должно соответствовать уровню громкости генерируемого звука.

Для регулировки TSG, пожалуйста, обратитесь к специалисту-сурдологу.

В случае появления побочных эффектов в результате использования звукового генератора, например, головокружения, тошноты, головных болей, субъективно воспринимаемого снижения функции органа слуха или усиления тиннитуса, необходимо прекратить использование звукового генератора и пройти медицинский осмотр.

Целевая категория населения

Целевую категорию населения составляют взрослые в возрасте старше 18 лет. Кроме того, данное изделие можно использовать для детей в возрасте от 12 лет и старше. Однако дети и лица с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития должны быть обучены процедуре размещения и извлечения слухового аппарата с модулем TSG. Обучение этой процедуре должен выполнять врач, аудиолог, специалист-сурдолог или опекун.

Важное примечание для будущих пользователей звукового генератора

Устройство для маскировки тиннитуса — это электронное устройство, предназначенное для генерирования шума, интенсивность и диапазон частот которого являются достаточными для того, чтобы замаскировать внутренние шумы. Данное устройство также используется для того, чтобы помогать пользователю слышать внешние шумы и речь.

Прежде чем использовать звуковой генератор, лица, страдающие тиннитусом, обязательно должны обратиться к сертифицированному врачу (желательно специализирующемуся на заболеваниях органа слуха), чтобы пройти медицинское обследование. К числу сертифицированных врачей, специализирующихся на заболеваниях органа слуха, относятся отоларингологи, отологи и оториноларингологи.

Цель медицинского обследования — удостовериться в том, что все излечимые заболевания, которые могут вызывать появление тиннитуса, выявлены и вылечены, прежде чем будет использоваться слуховой аппарат со звуковым генератором.

Звуковой генератор — это устройство, генерирующее звуки, которые используются в соответствии с надлежащими рекомендациями и/или в рамках программы борьбы с тиннитусом для облегчения состояния пациентов, страдающих тиннитусом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ⚠ • В случае ненадлежащего использования звуковые генераторы могут представлять опасность.
- Звуковые генераторы должны использоваться строго в соответствии с предписаниями врача, аудиолога или специалиста-сурдолога.
- Звуковые генераторы — это не игрушка; их необходимо хранить вне досягаемости от всех (особенно детей и домашних животных), кто может нанести себе травму этими устройствами.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- В случае появления побочных эффектов при использовании звукового генератора, например, головокружения, тошноты, головных болей, субъективно воспринимаемого снижения функции органа слуха или усиления тиннитуса, необходимо прекратить использование звукового генератора и пройти медицинский осмотр.
- Прекратите использование звукового генератора и в кратчайшие сроки проконсультируйтесь с сертифицированным врачом, если у вас возникло одно из нижеперечисленных состояний:

1. Видимая врожденная или возникшая в результате травмы деформация уха.
2. Наличие в анамнезе данных об обильных выделениях из уха в течение предшествующих 90 дней.
3. Наличие в анамнезе данных о внезапной или стремительной прогрессирующей потере слуха в течение предшествующих 90 дней.

4. Острые или хронические приступы головокружения.

5. Внезапная или недавняя односторонняя потеря слуха в течение предшествующих 90 дней.

6. Костно-воздушный разрыв равен или превышает 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц.

7. Видимые признаки значительного скопления ушной серы или наличия инородного тела в ушном канале.

8. Боль или дискомфорт в ухе.

- Прекратите использование звукового генератора тиннитуса и в кратчайшие сроки проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом, если при использовании звукового генератора у вас наблюдаются субъективно воспринимаемые изменения интенсивности тиннитуса, дискомфорт или трудности при восприятии речи.
- Регулятор громкости — это функция модуля TSG, используемая для настройки уровня мощности звукового генератора. Во избежание использования звукового генератора в непредусмотренных целях пользователями детского возраста или с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития регулятор громкости (в случае, если он активирован) должен быть настроен только на уменьшение уровня мощности звукового генератора.
- Во время ношения слухового аппарата с TSG дети и лица с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития должны находиться под присмотром опекуна.
- В случаях, когда пользователем является несовершеннолетнее лицо, изменение настроек звукового генератора тиннитуса посредством мобильного приложения должен выполнять только родитель или законный опекун.
- В случаях, когда пользователем является несовершеннолетнее лицо, использование ReSound Assist для дистанционной настройки звукового генератора тиннитуса должен осуществлять только родитель или законный опекун.

Специалист-сурдолог должен рекомендовать будущему пользователю звукового генератора в кратчайшие сроки проконсультироваться с сертифицированным врачом (желательно специалистом по заболеваниям органов слуха) до начала использования звукового генератора, если в результате опроса, фактических наблюдений или получения любой другой информации о будущем пользователе он установит наличие у будущего пользователя любого из нижеперечисленных состояний:

1. Видимая врожденная или возникшая в результате травмы деформация уха.

2. Наличие в анамнезе данных об обильных выделениях из уха в течение предшествующих 90 дней.

3. Наличие в анамнезе данных о внезапной или стремительной прогрессирующей потере слуха в течение предшествующих 90 дней.

4. Острые или хронические приступы головокружения.

5. Внезапная или недавняя односторонняя потеря слуха в течение предшествующих 90 дней.

6. Костно-воздушный разрыв равен или превышает 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц.

7. Видимые признаки значительного скопления ушной серы или наличия инородного тела в ушном канале.

8. Боль или дискомфорт в ухе.

⚠ ВНИМАНИЕ: Управлением по безопасности и гигиене труда установлено, что, работая на максимальной мощности, звуковой генератор может привести к снижению слуха. Согласно рекомендациям Национального института по охране и гигиене труда, пользователь должен использовать звуковой генератор не более восьми (8) часов в день, если это устройство работает на уровне звукового давления от 85 дБ или выше. Если звуковой генератор работает на уровне звукового давления от 90 дБ и выше, пользователь должен использовать звуковой генератор не более двух (2) часов в день. Ни в коем случае нельзя использовать звуковой генератор на некомфортном уровне громкости.

Предупреждения общего характера и меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом:
- Если вы подозреваете, что в вашем ушном канале есть инородное тело – Если у вас возникло раздражение на коже
- Если при использовании слухового аппарата скапливается избыточное количество ушной серы
 - См. также "Противопоказания",
 - Не надевайте слуховые аппараты во время воздействия излучения. Некоторые виды излучения, например, в магнитно-резонансных и компьютерных томографах, могут влиять на настройки слуховых аппаратов, что может вызвать сбой в их работе и повредить ваш слух.
 - Другие виды излучения, например, в системах охранной сигнализации, системах видеонаблюдения, мобильных телефонах, металлоискателях и радиооборудовании, не могут вызвать повреждение слуховых аппаратов. Однако они могут кратковременно повлиять на качество звука в слуховых аппаратах и вызвать появление нежелательных звуковых эффектов.
 - Ни в коем случае не используйте слуховые аппараты в местах, где присутствуют взрывоопасные газы, например, в шахтах, на объектах нефтедобычи и т. п., если только в этих местах не разрешено использовать слуховые аппараты. Использование слуховых аппаратов в местах, где это запрещено, может представлять опасность.
 - Не пытайтесь просушить слуховые аппараты в печи, микроволновой печи или другом нагревательном оборудовании. Это приведет к расплавлению слуховых аппаратов, что может стать причиной получения ожогов.
 - Внешние устройства, подключенные к электрическому входу, должны быть безопасными в соответствии с требованиями стандартов.
 - Запрещается вносить какие-либо изменения в это устройство.

Предупреждения касательно мощных слуховых аппаратов

Мощный слуховой аппарат может издавать очень громкий звук, чтобы компенсировать тяжелое или глубокое снижение слуха. Поэтому существует риск еще большего снижения оставшейся функции органов слуха.

- Ваши слуховые аппараты настроены на усиление тихих и громких звуков в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Если усиление кажется слишком громким, или вы подозреваете, что слуховой аппарат неисправен (например, вы слышите искаженные или необычные звуки), обратитесь к специалисту-сурдологу. Неисправный слуховой аппарат может повредить ваш слух.
- Как правило, громкие звуки могут оказывать отрицательное воздействие на остроту слуха. Это может быть громкая музыка или шумные места. Чтобы защитить свой слух, старайтесь реже подвергаться воздействию громких звуков или используйте средства для защиты органов слуха.
- Предупреждение для специалистов-сурдологов: Особую осторожность следует соблюдать при выборе и настройке слуховых аппаратов с максимальным уровнем звукового давления, превышающим 132 дБ и измеренным с использованием акустической камеры 2 сс в соответствии с ИЕС 60318-5. Существует риск еще большего снижения слуха.

ВНИМАНИЕ:

- Используйте слуховые аппараты согласно рекомендациям специалиста-сурдолога. Ненадлежащее использование может привести к повреждению слуха.
- Не используйте поврежденный слуховой аппарат. Он может функционировать ненадлежащим образом и, следовательно, ухудшить слух пользователя. У поврежденного

слухового аппарата могут быть острые края, о которые пользователь может поцарапаться или порезаться.

- Используйте только изготавливаемые производителем оригинальные расходные материалы, например серные фильтры.
- Используйте только аксессуары, предназначенные для использования с вашими слуховыми аппаратами. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.
- Не пытайтесь изменить форму слухового аппарата или его аксессуаров. Это может вызвать кожные реакции и стать причиной образования острых краев, о которые пользователь может поцарапаться или пораниться.
- Если у вас два слуховых аппарата, они могут быть запрограммированы по-разному. Не меняйте их местами, так как это может повредить слух. Ваши слуховые аппараты отмечены цветовой маркировкой. Левый – синий. Правый – красный.
- Если у ваших слуховых аппаратов нет цветовой маркировки, попросите специалиста-сурдолога нанести ее.
- Если вы испытываете побочные эффекты, обратитесь к специалисту-сурдологу. Побочные эффекты от ношения слухового аппарата могут быть следующими:
 - Головокружение – Тиннитус – Субъективно воспринимаемое ухудшение слуха – Тошнота– Головная боль – Кожная реакция– Скопление ушной серы
- Если вы подозреваете, что отсоединившийся серный фильтр или другой предмет застрял у вас в ушном канале, обратитесь к специалисту-сурдологу. Эти предметы могут нанести вред и стать причиной возникновения инфекции в ухе.
- Если в месте соприкосновения слухового аппарата с ухом или головой есть рана или травма, дальнейшее использование слухового аппарата может привести к ухудшению ее состояния или препятствовать ее заживлению. Для получения помощи проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.
- Ваши слуховые аппараты настроены в соответствии с вашим уровнем слуха. Не разрешайте другим лицам использовать ваши слуховые аппараты, поскольку это может повредить их слух.
- Если активированы функции, работающие по беспроводной связи, слуховой аппарат передает маломощные сигналы с цифровой кодировкой, чтобы общаться с другими беспроводными устройствами. Это может влиять на другие электронные устройства, хотя такая вероятность исключительно мала. Если это происходит, отдалите слуховой аппарат от электронного устройства, на функционирование которого он влияет.
- В ситуациях, когда это необходимо, выключайте функцию беспроводной связи в слуховых аппаратах.

Для специалистов-сурдологов

- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сформировавшийся уровень звукового давления в ушах у детей может быть значительно выше, чем в среднем у взрослых. Рекомендуется измерить показатель RECD (разница между данными, измеренными в ухе человека и в акустической камере/куплере), чтобы добиться правильного целевого значения для настроенного OSPL90.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Не выполняйте замену наружного корпуса или любых других деталей слухового аппарата, если только не обеспечена надлежащая защита от электростатических разрядов.

Предупреждения касательно кибербезопасности

Несоблюдение этих мер предосторожности может поставить под угрозу информационную безопасность вашего слухового аппарата и привести к потере слуха или возникновению тиннитуса.

ВНИМАНИЕ:

- Подключайте ваш слуховой аппарат только к проверенному компьютеру или мобильному устройству или компьютеру или мобильному устройству, которые используются специалистом-сурдологом.
- В течение 3 минут после включения слуховой аппарат остается доступным для установления связи. Не выполняйте перезагрузку слухового аппарата по просьбе лица, которому вы не доверяете, поскольку это может поставить под угрозу безопасность функционирования вашего устройства.
- Если ваше устройство неожиданно издает звук сопряжения, это может указывать на то, что кто-то получил доступ к вашему устройству.
- Подключайте ваш слуховой аппарат только к официальному мобильному приложению ReSound.
- Принимайте только запланированные обновления в рамках удаленной поднастройки.
- Всегда используйте новейшее программное обеспечение, доступное для вашего слухового аппарата.
- Принимайте только запланированные звонки по предоставлению online помощи от специалиста-сурдолога.

Выявление и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
«Обратная связь» или свист	Правильно ли размещен ушной вкладыш или колпачок в ухе?	Повторно вставьте его.
	Звук — слишком громкий?	Уменьшите громкость.
	Сломана трубка ресивера, или засорен ушной вкладыш?	Посетите специалиста-сурдолога.
	Вы держите какой-либо предмет (например, шапку или телефонную трубку) возле слухового аппарата?	Отодвиньте руку с этим предметом, чтобы между ним и слуховым аппаратом было больше места.
	В ухе скопилась ушная сера?	Посетите врача.
Отсутствует звук	Слуховой аппарат включен?	Включите его.
	В слуховом аппарате есть батарейка?	Вставьте новую батарейку.
	Батарейка — в исправном состоянии?	Замените ее на новую.
	Сломана трубка ресивера, или засорен ушной вкладыш?	Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.
	В ухе скопилась ушная сера?	Посетите врача.
Звук — искаженный, прерывистый или слабый?	Батарейка разряжена?	Замените ее на новую.
	Батарейка загрязнена?	Очистите ее или замените на новую.
	Сломана трубка ресивера, или засорен ушной вкладыш?	Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.
	В слуховом аппарате скопилась влага?	Используйте влагопоглотитель (набор для сушки).
Батарейка очень быстро разряжается	Вы оставляли слуховой аппарат включенным на длительное время?	Всегда выключайте слуховые аппараты, когда не используете их, например, на ночь.
	Батарейка — старая?	Посмотрите на упаковке от батарейки.

Гарантийные обязательства и ремонт

На свои слуховые аппараты компания-производитель предоставляет гарантию на случай дефектов изготовления или материалов, как описано в соответствующей гарантийной документации. В рамках своей политики сервисного обслуживания компания-производитель обязуется обеспечивать функциональность своих слуховых аппаратов, по меньшей мере, на ее исходном уровне.

Бесплатное гарантийное обслуживание слуховых аппаратов ReSound осуществляется в течение 12 месяцев со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати (торгующей организации) в руководстве пользователя и гарантийном талоне;
- предъявлении беспроводного аксессуара в чистом виде.

В случае отсутствия даты продажи гарантийные обязательства вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые аппараты:

- с механическими повреждениями,
- носящие следы химического воздействия,
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве пользователя.

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантийный период слуховых аппаратов указан на гарантийном талоне, который выдается специалистом-сурдологом.

Гарантийный срок хранения СА 2 года с момента изготовления.

Неисправные слуховые аппараты должны быть отремонтированы квалифицированным техническим специалистом. Не пытайтесь открыть корпус слуховых аппаратов, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.

В случае отсутствия даты продажи гарантийные обязательства вступают в силу с даты проверки.

Гарантийное обслуживание слуховых аппаратов ReSound осуществляет:

Общество с ограниченной ответственностью «Джи-Эн Хиринг РУС» 125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1

+7 (495) 697-30-10, +79175601981

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Условия эксплуатации:

от +5 °C до +40 °C при относительной влажности воздуха 15 – 90%, без образования конденсата, но без требования относительно парциального давления водяного пара выше 50 гПа. Допустимым является атмосферное давление в диапазоне 700 гПа и 1060 гПа.

Условия хранения: Температура воздуха От -20 °C до +60 °C Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата Не более 90% Атмосферное давление от 500 гПа до 1100 гПа

Условия транспортирования: Температура воздуха От -20 °C до +60 °C Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата Не более 90% Атмосферное давление От 500 гПа до 1100 гПа

Приблизительный срок службы


Приблизительный срок службы изделия при использовании по назначению составляет:

Устройство	Срок службы
Слуховой аппарат	5 лет
Вкладыш	3 месяца
Ресиверы	2 года
Электронные аксессуары, например, беспроводные аксессуары	5 лет


Изделия соответствуют следующим нормативным требованиям:



EN/(IEC) 60601-1-2 (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
EN ISO 10993-5 (ГОСТ ISO 10993-5-2023	Изделия медицинские электрические. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
EN ISO 10993-10 (ГОСТ ISO 10993-10-2023)	Изделия медицинские электрические. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
IEC 60118-13 ГОСТ IEC 60118-13-2022	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Совместимость. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств
ГОСТ Р МЭК 62304-2022	Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла
ГОСТ Р 50444-2020	«Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 51024-2012	Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022	«Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»;
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	«Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014	Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность
ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003	Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-12-2023	«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Отбор и подготовка образцов для проведения исследований»
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности





Описание Аппарата слуховой заушной с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модели RU961-DRW, RU761-DRW, RU561-DRW RU461-DRW

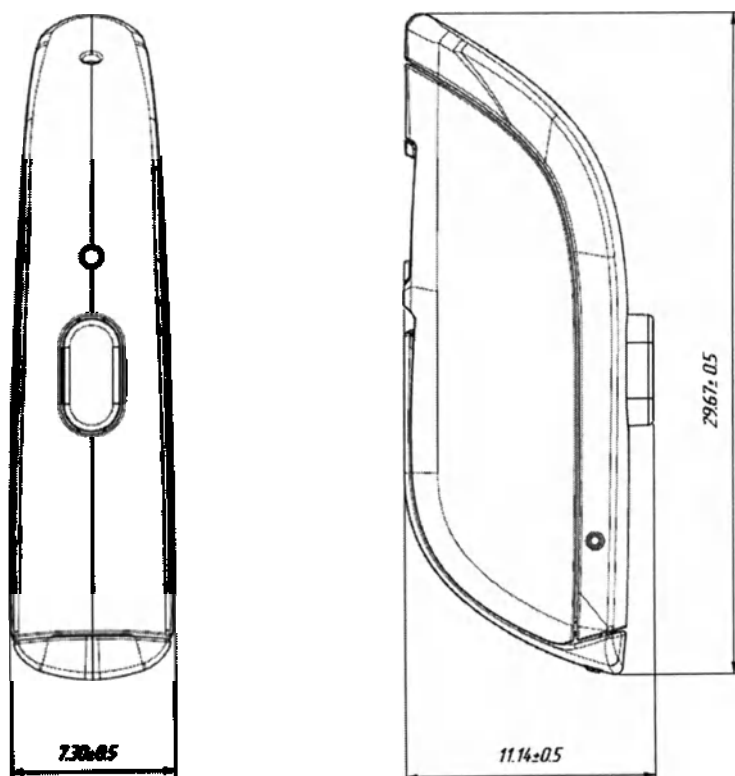



Масса: $1,48 \pm 0,2$ г.

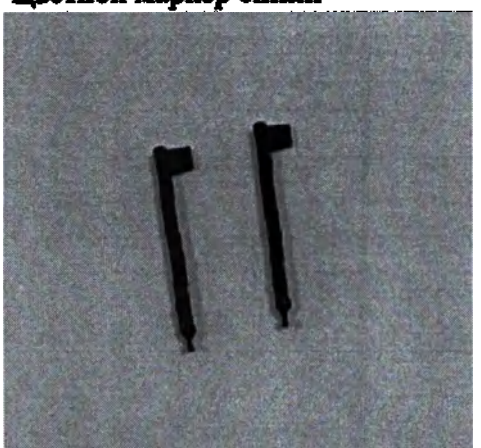Внешний вид	Описание
Программное обеспечение ReSound Smart Fit 	Версия ПО: 1.16 (подробная информация см.раздел 10) Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: 57х18х11 ±0,5 мм. Масса: 16 ±0,2 г.
Элемент питания тип 312 	Элемент питания является источником питания СА Напряжение: 1,45 В. Размер блистера ДхШхВ, мм: (93 x 47,5 x 0,4) ±0,5 мм. Масса блистера: 7 ±0,2 г.
Цветной маркер красный Цветной маркер синий 	Служат для индикации правого и левого слуховых аппаратов. Установка маркеров осуществляется однократно в авторизованном сервисном центре и/или специалистом по слухопротезированию. Замена маркеров не предусмотрена, но, при необходимости, может быть выполнена в авторизованном сервисном центре. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (27,2х4,7х1,9) ±0,5 мм. Масса: 0,09 ±0,02 г.

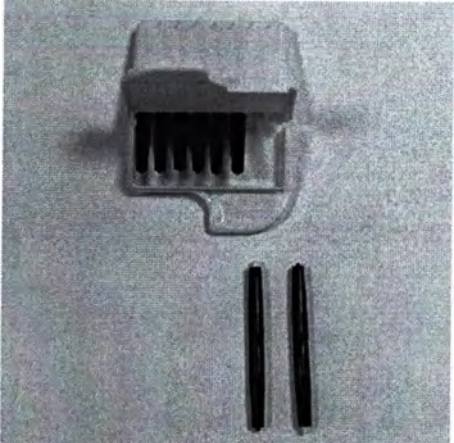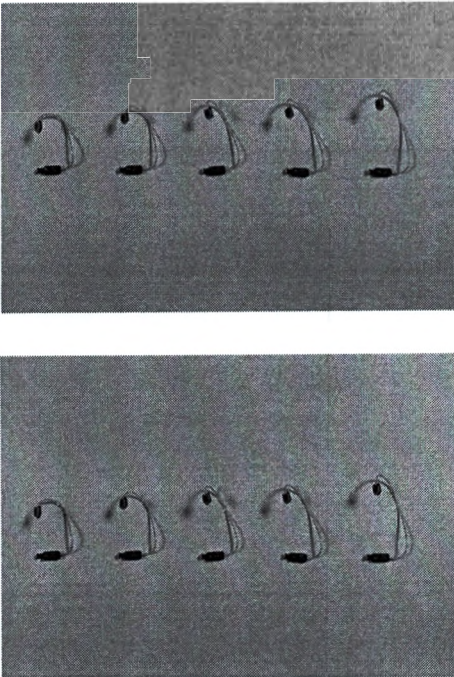Фильтр серный 	Устанавливается в ресивер для защиты ресивера от серы. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: Кейс: (52,5х36,5х5,5) ±0,5 мм. Масса: 7 ±0,2 г. Фильтр на палочке для установки: (39,5х3,2х3,2) ±0,5 мм Масса: 0,38±0,2 г.
Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP 	Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Размер 0: ДхШхø, мм: (27,0 х 18,0 х 3,0)±0,5 мм. Масса: 0,23±0,02 г. Размер 1: ДхШхø, мм: (30,0 х 18,0 х 3,0) ±0,5 мм Масса: 0,23±0,02 г. Размер 2: ДхШхø, мм: (33,0 х 18,0 х 3,0)±0,5 мм Масса: 0,23±0,02 г. Размер 3: ДхШхø, мм: (35,0 х 18,0 х 3,0) ±0,5 мм. Масса: 0,24 ±0,02 г. Размер 4: ДхШхø, мм: (37,0 х 18,0 х 3,0) ±0,5 мм. Масса: 0,24 ±0,02 г.

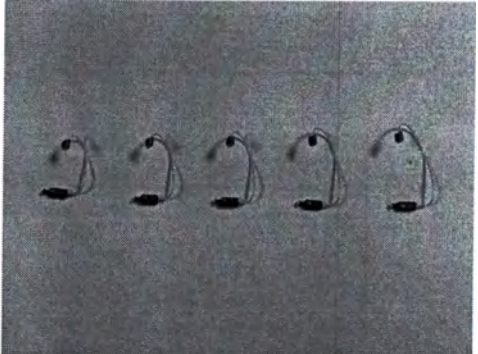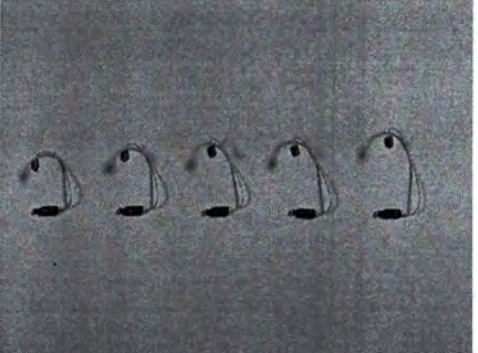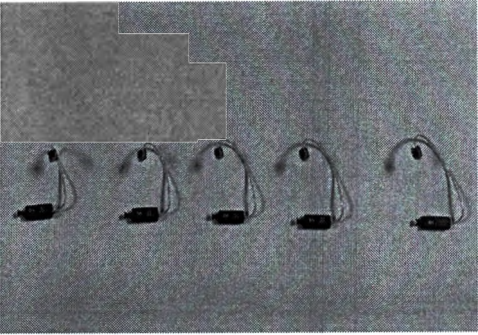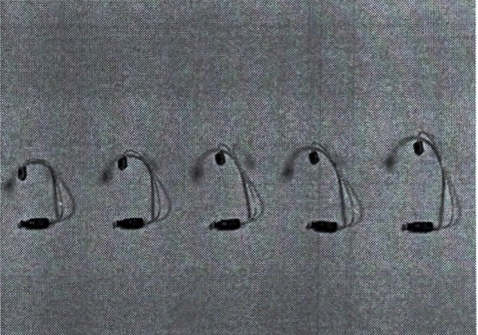Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип МР  	Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Размер 0: ДхШхØ, мм: 27,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,30±0,02 г. Размер 1: ДхШхØ, мм: 30,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,30±0,02 г. Размер 2: ДхШхØ, мм: 33,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,30±0,02 г. Размер 3: ДхШхØ, мм: 35,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,31 ±0,02 г. Размер 4: ДхШхØ, мм: 37,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,31 ±0,02 г.
Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип НР  	Элемент слухового аппарата, кото-рый преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Размер 0: ДхШхØ, мм: 27,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,53±0,02 г. Размер 1: ДхШхØ, мм: 30,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,53 ±0,02 г. Размер 2: ДхШхØ, мм: 31,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,53 ±0,02 г. Размер 3: ДхШхØ, мм: 35,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,55 ±0,02 г. Размер 4: ДхШхØ, мм: 38,0 x 18,0 x3,0 ±0,5 мм. Масса: 0,55 ±0,02 г.

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE

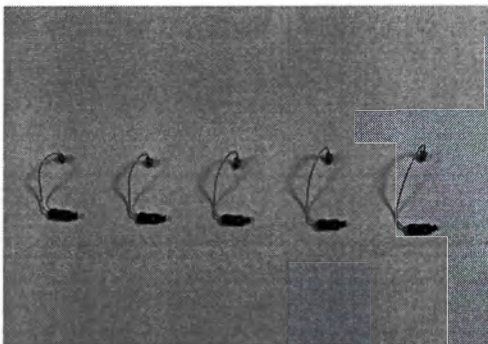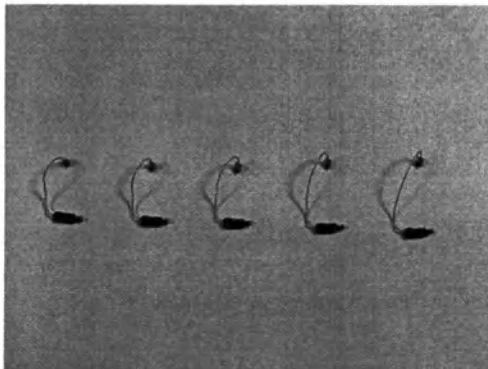

Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Размер 0: ДхШхВ, мм: 29,6 x 19,5 x 3,0 ±0,5 мм.
Масса: 0,35±0,02 г.


Размер 1: ДхШхВ, мм: 31,6 x 19,5 x 3,0 ±0,5 мм.
Масса: 0,37±0,02 г.

Размер 2: ДхШхВ, мм: 33,6 x 19,5 x 3,0 ±0,5 мм.
Масса: 0,37±0,02 г.

Размер 3: ДхШхВ, мм: 35,6 x 19,5 x 3,0 ±0,5 мм.
Масса: 0,37±0,02 г.




Размер 4: ДхШхВ, мм: 37,6 x 19,5 x 3,0 ±0,5 мм.
Масса: 0,37±0,02 г.



Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP


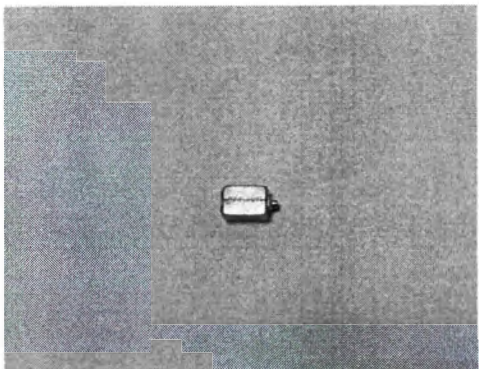




Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Габаритные размеры: ДхШхВ, мм:
10 x 6 x 4 ±0,2 мм
Масса: 0,60 ±0,02 г

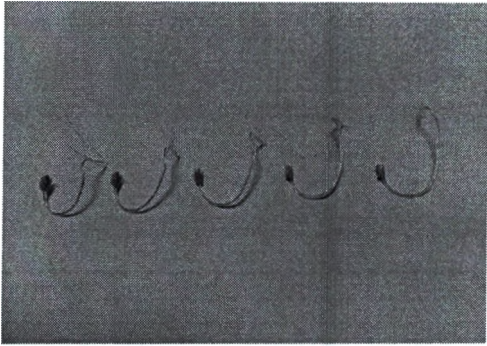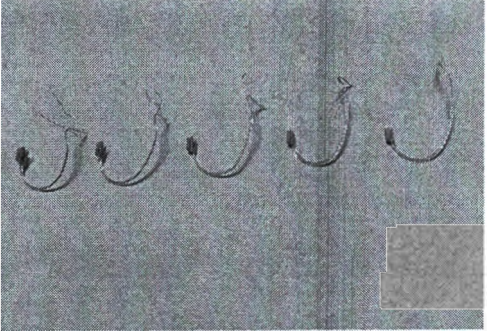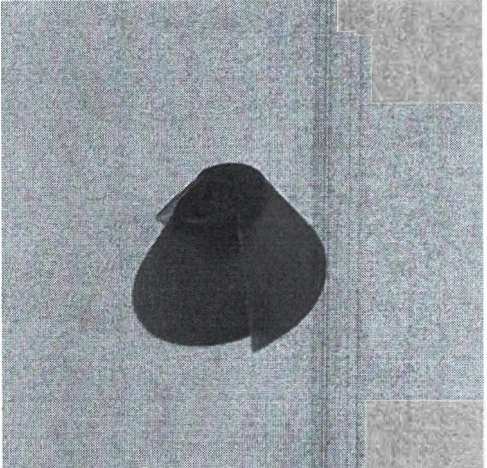
Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP  	Предназначен для соединения с ресивером тип UP Размер 0: ДхШхВ, мм: 14,9 x 17,5 x 0,8 ±0,5 мм Масса: 0,06±0,02 г Размер 1: ДхШхВ, мм: 17,1 x 19,31 x 0,8 ±0,5 мм Масса: 0,06±0,02 г Размер 2: ДхШхВ, мм: 17,3 x 23,14 x 0,8 ±0,5 мм Масса: 0,06±0,02 г Размер 3: ДхШхВ, мм: 20,1 x 27,69 x 0,8 ±0,5 мм Масса: 0,06±0,02 г Размер 4: ДхШхВ, мм: 20,1 x 31,02 x 0,8 ±0,5 мм Масса: 0,07±0,02 г
Вкладыш SF3 тюльпан 	Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале. Высота: 8 ±0,2 мм. Диаметр: 12,5 ±0,2 мм. Масса: 0,12±0,02 г.

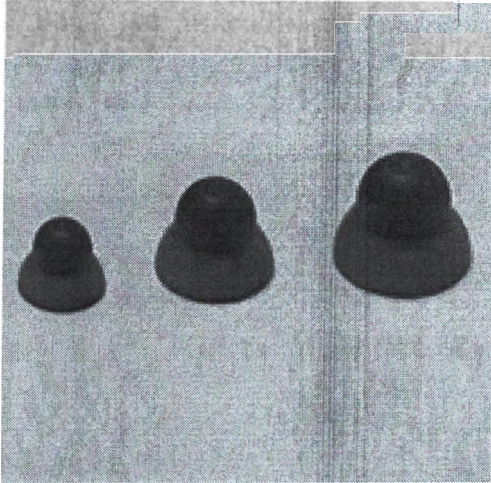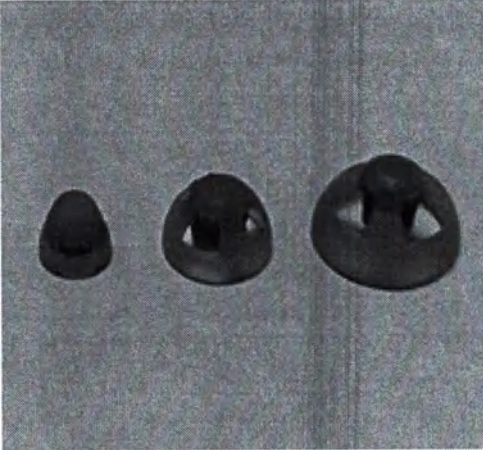Вкладыш SF3 мощный 	Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале. Размер малый: Высота: $7,6 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $5,6 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,09 \pm 0,02$ г. Размер средний: Высота: $10,0 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,16 \pm 0,02$ г. Размер большой: Высота: $11,5 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $11,5 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,20 \pm 0,02$ г.
Вкладыш SF3 открытый 	Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале. Размер малый: Высота: $4,3 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $5,0 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,1 \pm 0,02$ г. Размер средний: Высота: $5,1 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $7,6 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,07 \pm 0,02$ г. Размер большой: Высота: $6,5 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,04 \pm 0,02$ г.

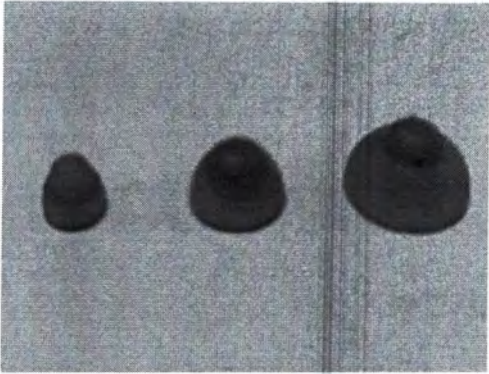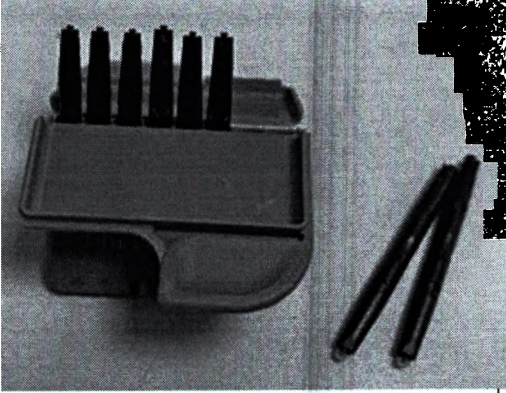Вкладыш SF3 закрытый 	Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале. Размер малый: Высота: $4,3 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $5,0 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,05 \pm 0,02$ г. Размер средний: Высота: $5,1 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $7,6 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,07 \pm 0,02$ г. Размер большой: Высота: $6,5 \pm 0,2$ мм. Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм. Масса: $0,12 \pm 0,02$ г.
Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE 	Размер кейса: ДхШхВ, мм: $52,5 \times 36,5 \times 5,5 \pm 0,5$ мм Масса: $7 \pm 0,2$ г Фильтр на палочке: Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: $(39,5 \times 3,2 \times 3,2) \pm 0,5$ мм Масса: $0,38 \pm 0,2$ г

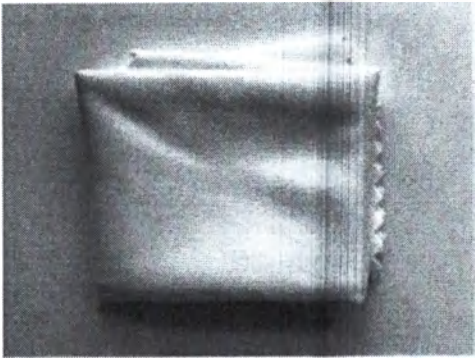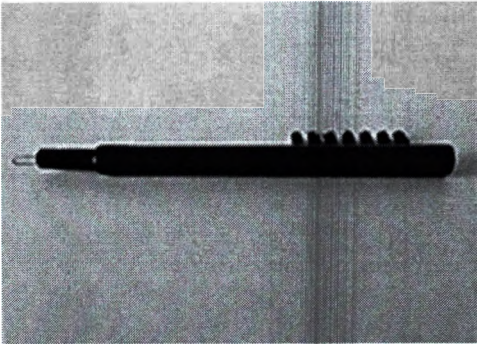
Футляр пластиковый 	Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: $(94 \times 62 \times 27) \pm 0,5$ мм. Масса: 55 ± 2 г.
Набор для очистки: салфетка, щетка Салфетка:  Щетка: 	Габаритные размеры ДхШхВ, мм: Салфетка: $(150 \times 150 \times 0,3) \pm 0,5$ мм. Масса: $3 \pm 0,2$ г Щетка: $(62 \times 4 \times 8) \pm 0,5$ мм. Масса $0,78 \pm 0,2$ г.

**Упаковка для аппарата слухового
заушного с ресивером в ухе ReSound
серии OMNIA с принадлежностями**

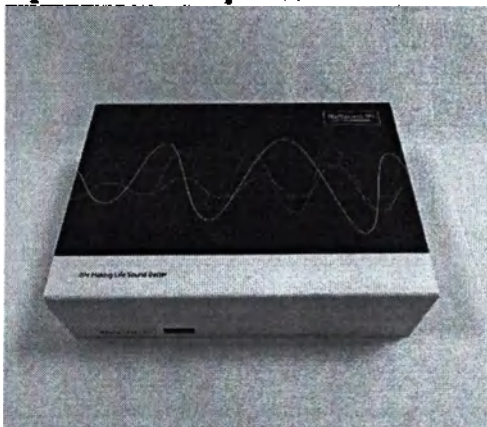


**Габаритные размеры ДхШхВ, мм:
(165х117х45)±5 мм
Масса: 81±2 г.**


Описание Аппарата слухового заушного с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модели RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW

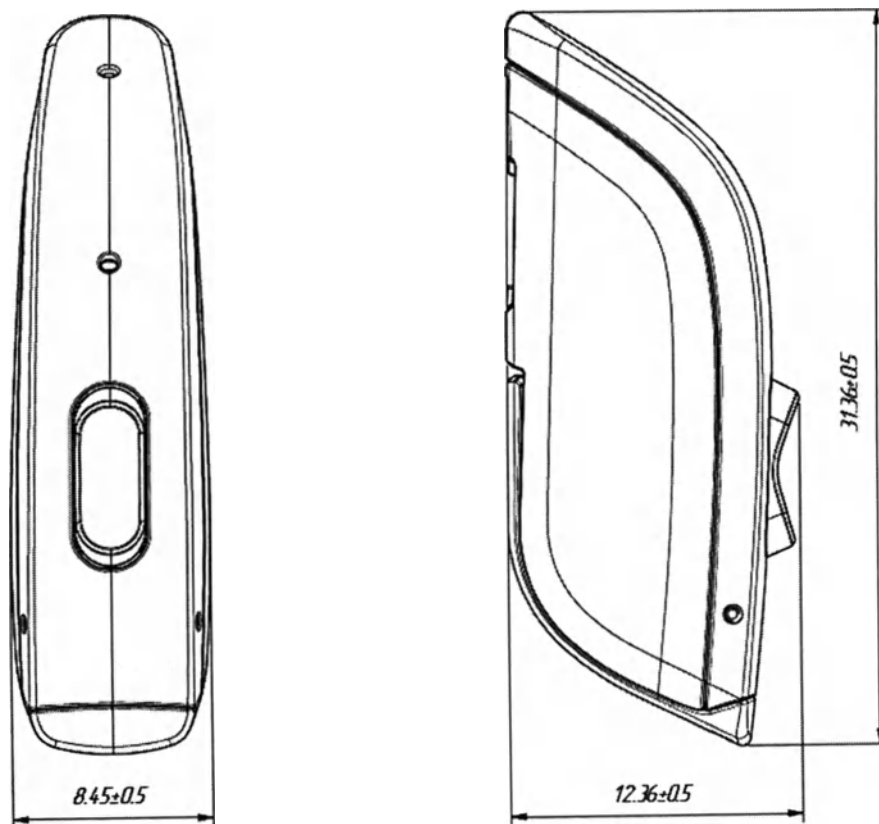

Масса: $1,91 \pm 0,2$ г.

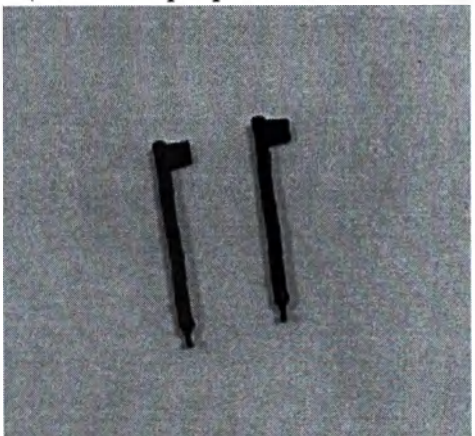Внешний вид	Описание
Программное обеспечение ReSound Smart Fit 	Версия ПО: 1.16 (подробная информация см.раздел 10) Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (57x18x11) ±0,5 мм. Масса: 16 ±0,2 г.
Элемент питания тип 13 	Элемент питания является источником питания СА Напряжение: 1,45 В. Размер блистера ДхШхВ, мм: (93 x 47,5x 0,65)±0,5 мм. Масса блистера: 7 ±0,2 г.
Цветной маркер красный Цветной маркер синий 	Служат для индикации правого и левого слуховых аппаратов. Установка маркеров осуществляется однократно в авторизованном сервисном центре и/или специалистом по слухопротезированию. Замена маркеров не предусмотрена, но, при необходимости, может быть выполнена в авторизованном сервисном центре. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (27,2x4,7x1,9) ±0,5 мм. Масса: 0,09 ±0,2 г.

Фильтр серный

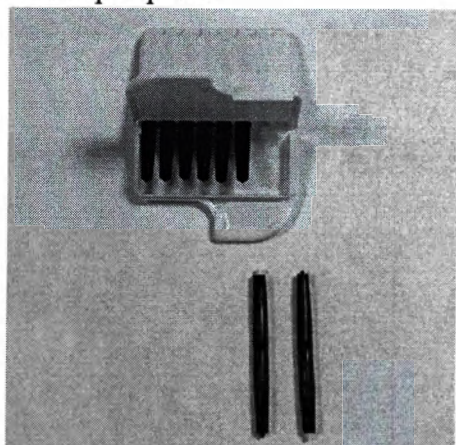

Устанавливается в ресивер для защиты ресивера от серы.

Габаритные размеры: ДхШхВ, мм:

Кейс: $(52,5 \times 36,5 \times 5,5) \pm 0,5$ мм.



Масса: $7 \pm 0,2$ г.

Фильтр на палочке для установки:

$(39,5 \times 3,2 \times 3,2) \pm 0,5$ мм

Масса: $0,38 \pm 0,2$ г.

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP

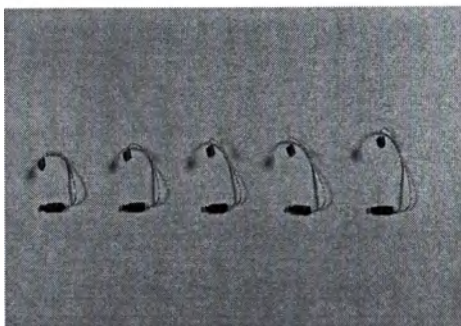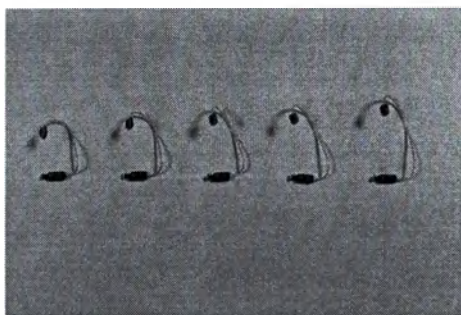

Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Размер 0: ДхШхø, мм: $(27,0 \times 18,0 \times 3,0) \pm 0,5$ мм.

Масса: $0,23 \pm 0,02$ г.

Размер 1: ДхШхø, мм: $(30,0 \times 18,0 \times 3,0) \pm 0,5$ мм

Масса: $0,23 \pm 0,02$ г.

Размер 2: ДхШхø, мм: $(33,0 \times 18,0 \times 3,0) \pm 0,5$ мм

Масса: $0,23 \pm 0,02$ г.



Размер 3: ДхШхø, мм: $(35,0 \times 18,0 \times 3,0) \pm 0,5$ мм.

Масса: $0,24 \pm 0,02$ г.

Размер 4: ДхШхø, мм: $(37,0 \times 18,0 \times 3,0) \pm 0,5$ мм.

Масса: $0,24 \pm 0,02$ г.

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип МР

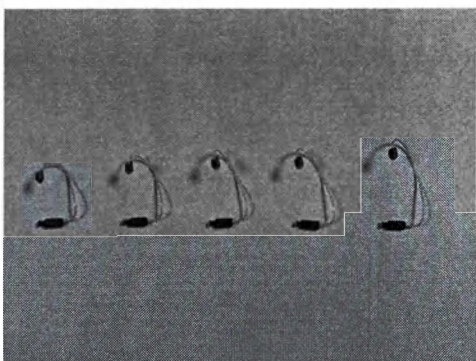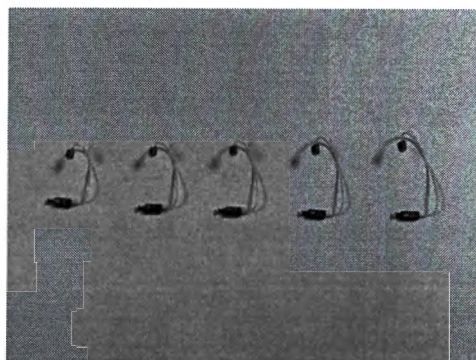

Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Размер 0: ДхШхӨ, мм:(27,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,30 $\pm 0,2$ г.



Размер 1: ДхШхӨ, мм:(30,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,30 $\pm 0,2$ г.

Размер 2: ДхШхӨ, мм:(33,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,30 $\pm 0,2$ г.

Размер 3: ДхШхӨ, мм:(35,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,31 $\pm 0,2$ г.

Размер 4: ДхШхӨ, мм:(37,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,31 $\pm 0,2$ г.

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип НР

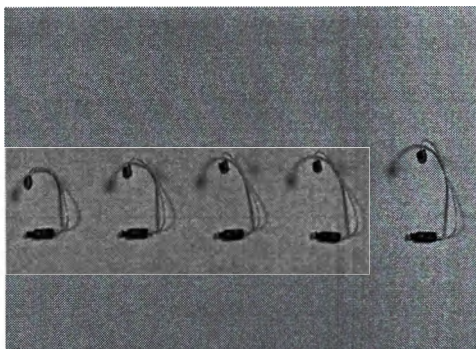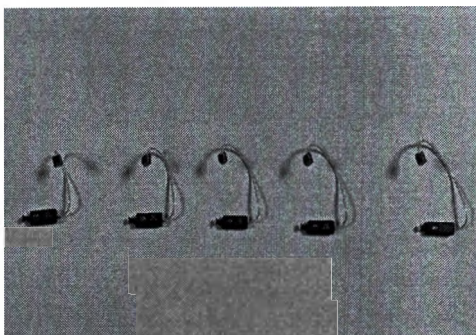

Элемент слухового аппарата, кото-рый преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.




Размер 0: ДхШхӨ, мм:(27,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,53 $\pm 0,2$ г.

Размер 1: ДхШхӨ, мм:(30,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,53 $\pm 0,2$ г.



Размер 2: ДхШхӨ, мм:(31,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,53 $\pm 0,2$ г.

Размер 3: ДхШхӨ, мм:(35,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,55 $\pm 0,2$ г.

Размер 4: ДхШхӨ, мм:(38,0 x 18,0 x 3,0) $\pm 0,5$ мм.
Масса: 0,55 $\pm 0,2$ г.

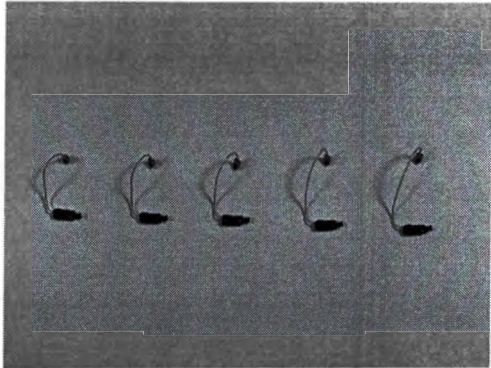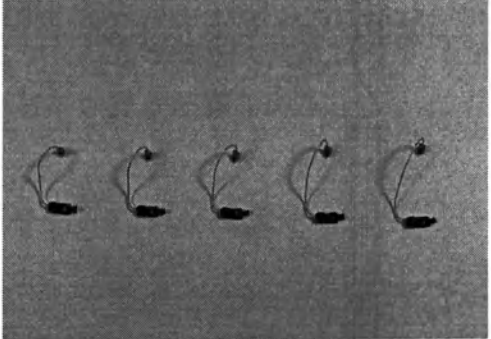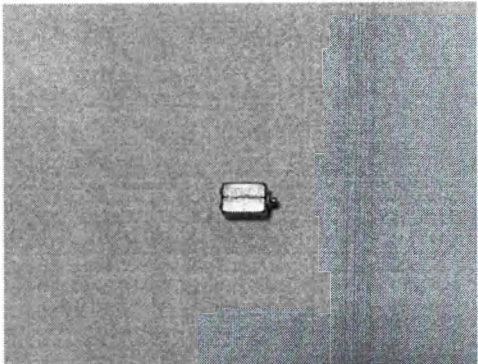Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE  	Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Размер 0: ДхШхØ, мм:(29,6 x 19,5 x 3,0) ±0,5 мм. Масса: 0,35±0,2 г. Размер 1: ДхШхØ, мм:(31,6 x 19,5 x 3,0)±0,5 мм. Масса: 0,37±0,2 г. Размер 2: ДхШхØ, мм:(33,6 x 19,5 x 3,0)±0,5 мм. Масса: 0,37±0,2 г. Размер 3: ДхШхØ, мм:(35,6 x 19,5 x 3,0)±0,5 мм. Масса: 0,37±0,2 г. Размер 4: ДхШхØ, мм:(37,6 x 19,5 x 3,0) ±0,5 мм. Масса: 0,37±0,2 г.
Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP 	Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (10 x 6 x 4) ±0,2 мм Масса: 0,60 ±0,2 г

Звукопровод для ресивера SF для
слухового аппарата правый/левый,
тип UP

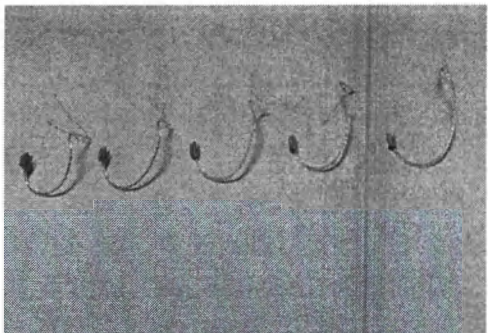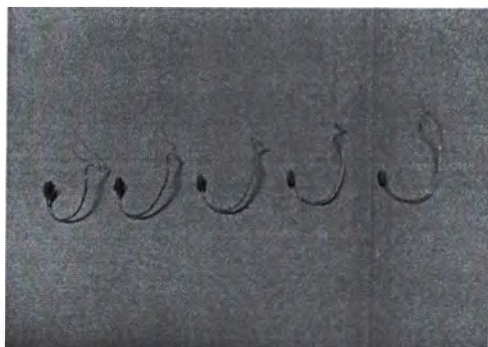

Предназначен для соединения с ресивером тип
UP

Размер 0: ДхШхВ, мм: (14,9 x 17,5 x 0,8) $\pm 0,5$ мм

Масса: 0,06 $\pm$ 0,02 г

Размер 1: ДхШхВ, мм: (17,1 x 19,31 x 0,8) $\pm 0,5$
мм

Масса: 0,06 $\pm$ 0,02 г

Размер 2: ДхШхВ, мм: (17,3 x 23,14 x 0,8) $\pm 0,5$
мм

Масса: 0,06 $\pm$ 0,02 г


Размер 3: ДхШхВ, мм: (20,1 x 27,69 x 0,8) $\pm 0,5$
мм

Масса: 0,06 $\pm$ 0,02 г

Размер 4: ДхШхВ, мм: (20,1 x 31,02 x 0,8) $\pm 0,5$
мм

Масса: 0,07 $\pm$ 0,02 г

Вкладыш SF3 тюльпан

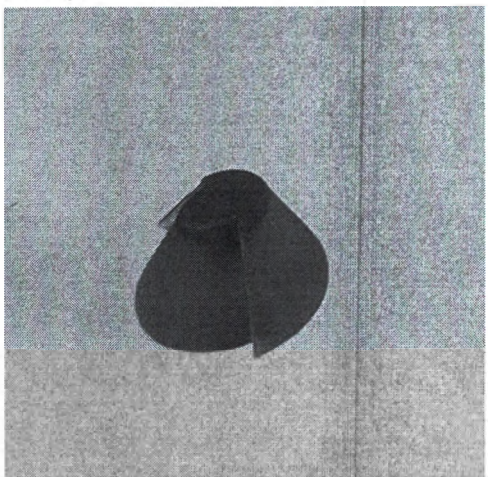


Вкладыш предназначен для подсоединения к
тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате.
Вкладыш необходим для размещения выходного
звукового отверстия слухового аппарата в
ушном канале.

Высота: 8 $\pm 0,2$ мм.

Диаметр: 12,5 $\pm 0,2$ мм.

Масса: 0,12 $\pm$ 0,02 г.

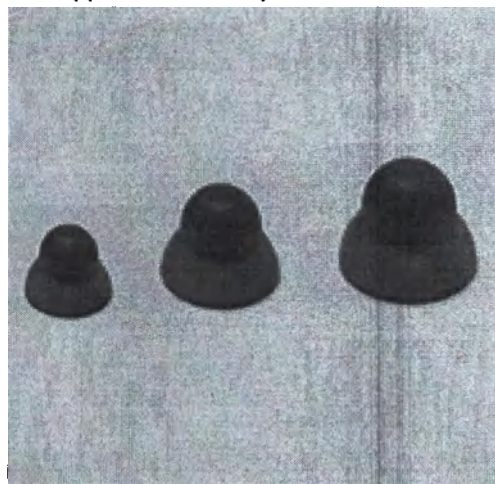Вкладыш SF3 мощный

Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале.

Размер малый:

Высота: $7,6 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $5,6 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,09 \pm 0,02$ г.

Размер средний:

Высота: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм.


Масса: $0,16 \pm 0,02$ г.

Размер большой:

Высота: $11,5 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $11,5 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,20 \pm 0,02$ г.

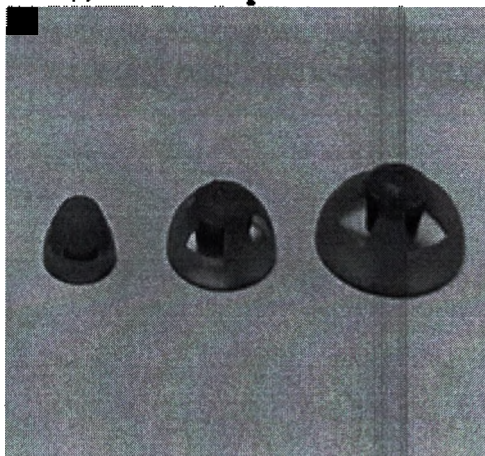Вкладыш SF3 открытый

Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале.

Размер малый:

Высота: $4,3 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $5,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,1 \pm 0,02$ г.

Размер средний:

Высота: $5,1 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $7,6 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,07 \pm 0,02$ г.


Размер малый:

Высота: $6,5 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,04 \pm 0,02$ г.

Вкладыш SF3 закрытый

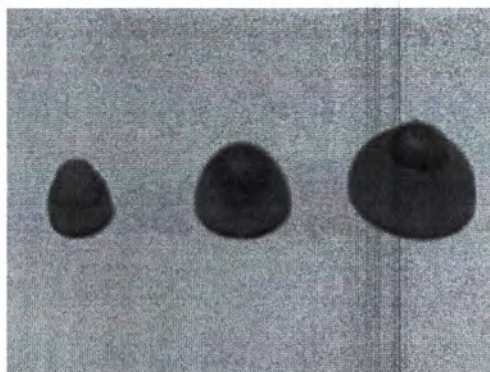

Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале.

Размер малый:

Высота: $4,3 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $5,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,05 \pm 0,02$ г.

Размер средний:

Высота: $5,1 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $7,6 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,07 \pm 0,02$ г.

Размер малый:

Высота: $6,5 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,12 \pm 0,02$ г.

Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE



Размер кейса: ДхШхВ, мм:

$(52,5 \times 36,5 \times 5,5) \pm 0,5$ мм



Масса: $7 \pm 0,2$ г

Фильтр на палочке:

Габаритные размеры: ДхШхВ, мм:

$(39,5 \times 3,2 \times 3,2) \pm 0,5$ мм

Масса: $0,38 \pm 0,2$ г

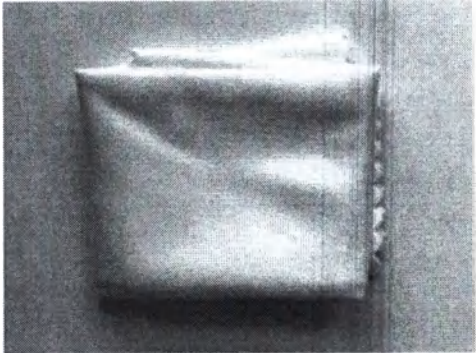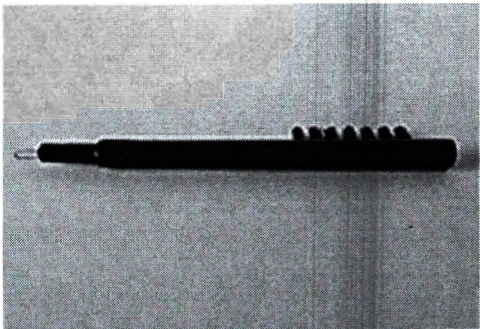Футляр пластиковый 	Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (94 x 62 x 27)±0,5 мм. Масса: 55 ±2 г.
Набор для очистки: салфетка, щетка Салфетка:  Щетка: 	Габаритные размеры ДхШхВ, мм: Салфетка: (150 x 150 x 0,3) ±0,5 мм. Масса: 3 ±0,2 г Щетка: (62 x 4 x 8 ±0,5) мм. Масса 0,78 ±0,2 г.

Упаковка для аппарата слухового
заушного с ресивером в ухе ReSound
серии OMNIA с принадлежностями



Габаритные размеры ДхШхВ, мм:
(165x117x45)±5 мм
Масса: 81±2 г.

Условные обозначения типов

Обозначения типа моделей слуховых аппаратов, описанных в данном руководстве пользователя:

CAR12A, FCC ID: X26CAR12A, IC: 6941C-CAR12A **CAR13A**, FCC ID: X26CAR13A, IC: 6941C-CAR13A.

Варианты слуховых аппаратов

Слуховые аппараты с ресивером в ухе (RIE) типа **CAR12A** с FCC ID X26CAR12A, номером IC 6941C-CAR12A и воздушно-цинковой батареей размера 312 представлены в следующих вариантах:

RU961-DRW, RU761-DRW, RU561-DRW, RU461-DRW.

Номинальная передаваемая радиочастотная мощность на выходе составляет -10,34 дБм.

Слуховые аппараты с ресивером в ухе (RIE) типа **CAR13A** с FCC ID X26CAR13A, номером IC 6941C-CAR13A и воздушно-цинковой батареей размера 13 представлены в следующих вариантах:

RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW.

Номинальная передаваемая радиочастотная мощность на выходе составляет -7,1 дБм.

Данное устройство передает и принимает радиочастотные сигналы в частотном диапазоне от 2,4 ГГц до 2,48 ГГц.

Все вышеуказанные слуховые аппараты оснащены радиоустройством, работающим по принципу магнитной индукции на частоте 10,66 МГц. Сила магнитного поля, генерируемого этим радиоустройством составляет: Макс. -24 дБмкА/м на расстоянии 10 м.


Технические характеристики

Слуховые аппараты с ресивером в ухе (RIE) — Ресивер LP/MP


Модели: RU961-DRW, RU761-DRW, RU561-DRW, RU461-DRW, RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW

		LP	MP	
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) (2 нижние кривые на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	УВЧ	32	37	дБ
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) (2 верхние кривые на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	Макс. УВЧ	53 46	58 52	дБ
Максимальная мощность (90 дБ УЗД на входе)	Макс. УВЧ	113 108	116 114	дБ УЗД
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц	0,5	0,6	%
	800 Гц	0,2	0,6	
	1600 Гц	0,4	0,7	
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе)*	Макс.	83	90	дБ УЗД
HFA - SPLIV @ 31,6 мА/м (ANSI)	УВЧ	92	97	
Полная чувствительность индукционной катушки при 1 мА/м	УВЧ	76	83	
Эквивалентный уровень шума без шумоподавления	1600 Гц	20	20	дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума со спектром 1/3 октавы, без шумоподавления		7	7	
Диапазон частот IEC 60118-0: 2015		100-9410	100-9160	Гц
Расход тока (в состоянии покоя/при использовании) (только для моделей DRW)		0,81/1,04	0,81/1,04	мА

Максимальная мощность (ВУЗД-90)

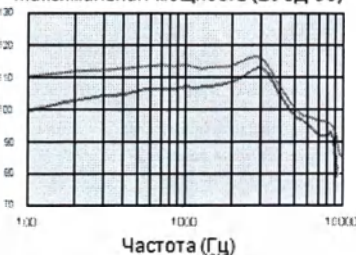

Полное и контрольное усиление

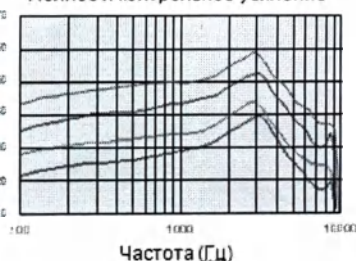

Измерено в соответствии с ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, JIS C 5512: 2015, соединительная камера 2сс.
* Индукционная катушка только для следующих моделей: RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW.


Слуховые аппараты с ресивером в ухе (RIE) — Ресивер HP/UP
Модели:RU961-DRW, RU761-DRW, RU561-DRW, RU461-DRW, RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW

		HP	UP	
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) (2 нижние кривые на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	УВЧ	40	47	дБ
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) (2 верхние кривые на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	Макс. УВЧ	65 59	75 65	дБ
Максимальная мощность (90 дБ УЗД на входе)	Макс. УВЧ	122 117	130 124	дБ УЗД
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц	0,3	1,0	%
	800 Гц	0,7	1,3	
	1600 Гц	0,7	0,1	
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе)*	Макс.	95	106	дБ УЗД
HFA - SPLIV @ 31,6 мА/м (ANSI)	УВЧ	100	108	
Полная чувствительность индукционной катушки при 1 мА/м	УВЧ	88	95	
Эквивалентный уровень шума без шумоподавления	1600 Гц	20	22	дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума со спектром 1/3 октавы, без шумоподавления		7	9	
Диапазон частот IEC 60118-0: 2015		100-7140	100-5010	Гц
Расход тока (в состоянии покоя/при использовании) (Только для моделей DRW)		0,81/1,04	0,81/1,04	мА

Максимальная мощность (ВУЗД-90)



Полное и контрольное усиление

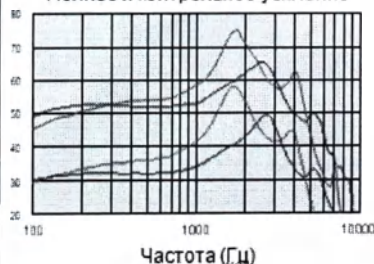


Измерено в соответствии с ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, JIS C 5512: 2015, соединительная камера 2сс.
 * Индукционная катушка только для следующих моделей: RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW.

Слуховые аппараты с ресивером в ухе (RIE) — Ресивер MM


Модели: RU961-DRW, RU761-DRW, RU561-DRW, RU461-DRW, RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW

MM			
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе) (Нижняя кривая на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	УВЧ	33	дБ
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) (Верхняя кривая на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	Макс. УВЧ	53 47	дБ
Максимальная мощность (90 дБ УЗД на входе)	Макс. УВЧ	115 110	дБ УЗД
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц 800 Гц 1600 Гц	0,1 0,9 0,4	%
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе)* HFA - SPLIV @ 31,6 мА/м (ANSI)	Макс. УВЧ	82 93	дБ УЗД
Полная чувствительность индукционной катушки при 1 мА/м	УВЧ	75	дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума без шумоподавления		20	дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума со спектром 1/3 октавы, без шумоподавления	1600 Гц	7	дБ УЗД
Диапазон частот IEC 60118-0: 2015		100-9100	Гц
Расход тока (в состоянии покоя/при использовании) (Только для моделей DRW)		0,82/1,04	мА

Максимальная мощность (ВУЗД-90)

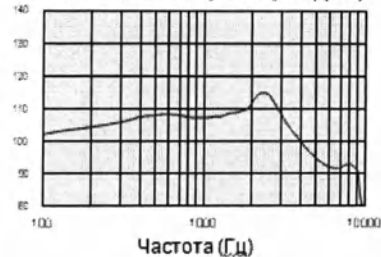

Полное и контрольное усиление

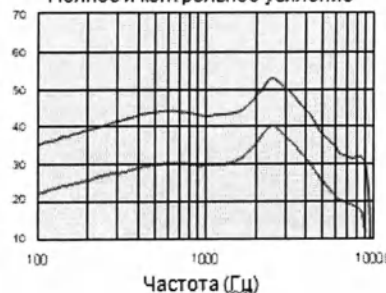

Измерено в соответствии с ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, JIS C 5512: 2015, соединительная камера 2сс.

* Индукционная катушка только для следующих моделей: RU962-DRW, RU762-DRW, RU562-DRW, RU462-DRW.

1 ПРИМЕЧАНИЕ:. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и в случае, если установка и использование данного оборудования не осуществляется в соответствии с надлежащими инструкциями, может создавать вредные помехи для средств радиосвязи.

Однако невозможно гарантировать то, что помехи не возникнут в определенной установке. Если данное оборудование все-таки создает вредные помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Измените положение приемной антенны или переставьте ее
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником
- Подключите оборудование к розетке или сети, отличной от сети, к которой подключен приемник – Для получения помощи проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радио-/телеоборудованию.

Портативные и мобильные радиочастотные средства могут воздействовать на медицинское изделие.

Медицинское изделие не следует применять в непосредственной близости другого оборудования или во взаимосвязи с ним.

Внесение изменений или модификаций может лишить пользователя права эксплуатировать данное оборудование.

Декларация производителя по электромагнитной совместимости

Применение принадлежностей, кабелей, иных, нежели указаны в данной инструкции по применению, за исключением приобретенных у производителя в качестве запасных частей, может привести к увеличению помех или снижению защищенности аппарата.

Электромагнитные излучения помех

Аппарат предназначен для использования при электромагнитных условиях, приведенных ниже. Заказчик и/или пользователь аппарата должен обеспечить нижеуказанные электромагнитные условия.

Таблица 1

Измерение излучения	соответствие	Электромагнитная совместимость
Радиочастотное излучение согласно CISPR 11	Группа 1	Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования
Радиочастотное излучение согласно CISPR 11	Класс В	Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома

		и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.
Излучение гармоник согласно ГОСТ IEC 61000-3-2	Не применяют	
Колебания напряжения согласно ГОСТ IEC 61000-3-3	Не применяют	

Электромагнитная помехоустойчивость

Аппарат слуховой костной проводимости предназначен для использования при электромагнитных условиях, приведенных ниже. Заказчик и/или Пользователь аппарата должен обеспечить нижеуказанные электромагнитные условия.

Таблица 6

Тест невосприимчивости	Тестовое значение по ГОСТ МЭК 60601-1-2	соответствие	Электромагнитная обстановка-рекомендации
Электростатический разряд ГОСТ МЭК 61000-4-2	+/-6 кВ контактный заряд +/-8 кВ разряд воздуха	+/-6 кВ +/-8 кВ	Полы должны быть деревянными или из керамической плитки. Если полы покрыты синтетическими материалами, относительная влажность должна быть не менее 30%
Величина магнитного поля частоты 50/60 Гц по ГОСТ МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Сила магнитных полей должна быть на уровне, типичном для коммерческого и/или медицинского применения.

Таблица 2

Тест невосприимчивости	Тестовое значение по ГОСТ МЭК 60601-1-2	Соответствие	Электромагнитная обстановка-рекомендации
Излученные высокочастотные	3В/м от 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В/м	Портативные и мобильные средства коммуникации, в том числе кабели, не должны использоваться ближе к любой части аппарата, чем рекомендованное удаление, рассчитанное из уравнения частоты излучателя

помехи ГОСТ МЭК 61000-4-3			Напряженность поля от фиксированных источников, как указано в отчете об электромагнитной совместимости, должно быть меньше уровня соответствия в каждом частотном диапазоне. Вблизи оборудования, обозначенного следующим символом, (((•))) может наблюдаться интерференция
------------------------------------	--	--	---

Примечание 1. При 80 МГц и 800 МГц выбирается более высокая частота.

Примечание 2. Данные рекомендации могут выполняться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от окружающих предметов и людей.

Напряженность поля от фиксированных излучателей, например, радиоприемников, телефонов (сотовых, беспроводных), мобильных и любительских радиоприемников, АМ, FM и TV приемников не может быть теоретически предсказана с высокой точностью. Для оценки электромагнитной среды с учетом фиксированных радиочастотных передатчиков следует учесть необходимость проведения электромагнитных изысканий на объекте. Если измеренная напряженность поля на участке, где используется аппарат, превышает допустимые уровни радиочастотного излучения, приведенные выше, то необходимо следить за его работой, чтобы обеспечить его нормальное функционирование. В случае ненормального функционирования возможна необходимость принятия дополнительных мер, таких как переориентация или перемещение прибора аппарат.

Рекомендовано удаление портативных и мобильных средств коммуникации от аппарата в соответствии с нормами ГОСТ МЭК 60601-1-2.

Аппарат предназначен для использования при электромагнитных условиях, при которых излучаемые радиочастотные помехи контролируются. Заказчик или пользователь может помочь предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и аппаратом как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.

Таблица 3

Частота излучателя	От 150 кГц до 80 МГц	От 150 кГц до 800 МГц	От 150 кГц до 2,5 ГГц
Номинальная выходная мощность излучателя, Вт	Безопасное расстояние, м	Безопасное расстояние, м	Безопасное расстояние, м
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

Примечание: 1. При 80 МГц и 800 МГц удаление выбирается исходя из более высокой частоты.

Примечание 2. Данные рекомендации могут выполняться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от окружающих предметов и людей.

Дополнительная информация

Все аппараты слуховые заушные с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями настраиваются в центрах протезирования или сервисных центрах, специалистом индивидуально в соответствии с потребностями клиента.

Для настройки аппаратов слуховых заушных с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями используется программное обеспечение ReSound Smart Fit (класс безопасности B).

Данное программное обеспечение для настройки, Resound Smart Fit, должно устанавливаться и использоваться только специалистами по слуху. Рекомендуется всегда обновлять программное обеспечение для настройки до последней.

Для настройки аппаратов слуховых заушных с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями используется стандартный интерфейсный адаптер для программирования слухового аппарата (программатор): HI-PRO, NOAHlink, AIRLINK2 , Noahlink Wireless, Speedlink

Интерфейсный адаптер для программирования слухового аппарата (программатор): HI-PRO, AIRLINK2 и др. и программное обеспечение не являются принадлежностями и поставляются отдельно в центры протезирования или сервисные центры.

Необходимыми требованиями для установки программного обеспечения являются:

ТРЕБОВАНИЯ К ПК	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК
Процессор	Процессор Intel Core i3 или аналогичный	Процессор Intel Core i7 или аналогичный
ОЗУ	4 ГБ	8 ГБ
Свободное место на жестком диске	8 ГБ	10 ГБ
Разрешение экрана	Полный экран - 1280 x 1024 Широкоформатный экран - 1366 x 768	Полный экран - 1400 x 1050 Широкоформатный экран - 1920 x 1080
Операционные системы	Windows 7 - 32bit/*64bit (SP1 или выше)	Windows 10 - 64-bit
Noah	4.12.1	4 .12 .1 (или выше)
Интернет-браузеры	• Internet Explorer (IE) - версия 11 (или выше) • Google Chrome - версии 41 и 42 (или выше) • Firefox - версии 39 и 40 (или выше) • Safari - версия 7 (или выше) <i>Мобильный браузер не поддерживается.</i>	
Порты	Порт USB 2 .0 (или выше)	
Приводы	DVD-ROM	
Звуковая карта	16-бит, стерео, совместимая с Microsoft DirectSound и DirectSound 3D	
Наружное оборудование	Принтер, *камера и *микрофон	

Некоторые части данного программного обеспечения написаны Кеннетом Маккеем (micro-ess) и лицензированы согласно следующим положениям и условиям:

Авторское право © 2014, Кеннет Маккей. Все права защищены.

Повторное распространение и использование в исходной и двоичной форме, при наличии или отсутствии модификаций, разрешено в случае соблюдения следующих условий:

- Повторное распространение исходного кода должно осуществляться с сохранением вышеуказанного уведомления об авторском праве, данного перечня условий и нижеприведенного заявления об ограничении ответственности.
- При повторном распространении в двоичной форме вышеуказанное уведомление об авторском праве, данный перечень условий и нижеприведенное заявление об ограничении ответственности должны быть изложены в документации и/или других материалах, которые прилагаются к распространяемым копиям.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ, И ОНИ НЕ НЕСУТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ И СОИСПОЛНИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ; ПОТЕРЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПЕРЕРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН И ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА,

ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЛЕДСТВИЕ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ В СИЛУ ДРУГИХ ПРИЧИН), ВОЗНИКАЮЩИХ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие значка Made for Apple означает, что аксессуар специально предназначен для установления связи с устройствами iPhone, iPad и iPod touch, а также сертифицирован компанией-разработчиком в соответствии с эксплуатационными стандартами компании Apple. Компания Apple не несет ответственность за эксплуатацию данного устройства или его соответствие нормативам и стандартам безопасности.

© 2022 GN Hearing A/S. Все права защищены. ReSound является торговой маркой GN Hearing A/S. Apple, логотип Apple, iPhone, iPad и iPod touch и Apple Watch являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками компании Google LLC. Текстовое написание и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Свидетельство о приемке и продаже

Аппараты слуховые заушные с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, сертифицированы.

Слуховой аппарат _____

Серийный № _____

призван годным для эксплуатации.

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____ М.П.

Изготовитель:

Джи-Эн РиСаунд А/С

Лаутрупбьорг, 7

DK2750 Баллеруп

Дания

**Корешок талона № 1
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации
_____ м.п.

**ТАЛОН № 1 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

**Корешок талона № 2
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации
_____ м.п.

**ТАЛОН № 2 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

**Корешок талона № 3
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации
_____ М.П.

**ТАЛОН № 3 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ М.П.

**Корешок талона № 4
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации
_____ М.П.

**ТАЛОН № 4 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ М.П.

Информация о слуховом аппарате

Левый слуховой аппарат		Правый слуховой аппарат	
Серийный номер		Серийный номер	
Номер модели		Номер модели	
Тип элемента питания	☐ Перезаряжаемый		
Режим работы	продолжительный		
Вид контакта с организмом человека	- кратковременный контакт (менее 24 ч) с неповрежденной кожей не стерильный.		
Класс защиты от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды	IP 68.		
В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1 тип рабочей части – В.			
СА не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения. В СА не применяются лекарственные средства, биологические материалы и наноматериалы. СА предназначен для индивидуального применения и является неинвазивным изделием.			
Аппарат НЕ предназначен для использования в среде с повышенным содержанием кислорода, или в комбинации кислорода с воспламеняющимися анестетиками и другими огнеопасными веществами!			

Тип	Закрытый	Открытый	Мощный	☐ Вкладыш-тольпан	☐ Ушной вкладыш КИЕ
ушного	вкладыш	вкладыш	вкладыш		
вкладыша	☐ Маленький ☐ Средний ☐ Большой	☐ Маленький ☐ Средний ☐ Большой	☐ Маленький ☐ Средний ☐ Большой		

Программа	Звуковой сигнал	Описание
1	Один звуковой сигнал	
2	Два звуковых сигнала	
3	Три звуковых сигнала	
4	Четыре звуковых сигнала	

Введение

Мы благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на слуховых аппаратах ReSound. Мы рекомендуем использовать слуховые аппараты каждый день.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно прочитайте это руководство, ПРЕЖДЕ ЧЕМ начать использовать ваши слуховые аппараты.

Этот документ действителен для следующих слуховых аппаратов:

I. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU960-DRWC, в составе:

Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU960-DRWC (цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;

2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit -1 шт. (при необходимости)

3. Цветной маркер красный – 1 шт.;

4. Цветной маркер синий – 1 шт.;

5. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

8. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP – 1 шт. (при необходимости);

9. Звуковод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

10. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

11. Вкладыш SF3 толстый, (при необходимости) - 10 шт./уп.

12. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

13. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

14. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

15. Набор для очистки: салфетка, щетка - 1 шт.;

16. Футляр пластиковый – 1 шт.;

17. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;

18. Зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 – 1 шт.;

-кабель для зарядки – 1 шт.;

-адаптер AC/DC – 1 шт.;

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA- 1 шт.

19. Зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки – 1 шт.;

-адаптер AC/DC – 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт.

20. Зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки – 1 шт.

-адаптер AC/DC – 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт.

Принадлежности:

1. Фильтр серный – 8 шт./уп.;

2. Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE – 8 шт./уп.

II. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU760-DRWC, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU760-DRWC (цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;

2. Программное обеспечения ReSound Smart Fit – 1 шт. (при необходимости);

3. Цветной маркер красный – 1 шт.;

4. Цветной маркер синий – 1 шт.;

5. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

8. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP – 1 шт. (при необходимости);

9. Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

10. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

11. Вкладыш SF3 тюльпан, 10 шт./уп. (при необходимости);

12. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой – 10 шт./уп. (при необходимости);

13. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой – 10 шт./уп. (при необходимости);

14. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой – 10 шт./уп. (при необходимости);

15. Набор для очистки: салфетка, щетка – 1 шт.;

16. Футляр пластиковый – 1 шт.;

17. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;

18. Зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 – 1 шт.;

-кабель для зарядки – 1 шт.;

-адаптер AC/DC – 1 шт.;

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт.

19.Зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки – 1 шт.;

-адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт.

20.Зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки – 1 шт.

-адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA– 1 шт.

Принадлежности:

1.Фильтр серый – 8 шт./уп.;

2.Набор серых фильтров для микрофона в ресивере M&RIE- 8 шт./уп.

III. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU760-DRWC, в составе:

1.Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU760-DRWC(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;

2.Программное обеспечения ReSound Smart Fit -1 шт. (при необходимости);

3.Цветной маркер красный - 1шт.;

4.Цветной маркер синий - 1шт.;

5.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4- 1шт.; (при необходимости);

6.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4- 1шт.; (при необходимости);

7.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4- 1шт.; (при необходимости);

8.Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP- 1шт.; (при необходимости);

9.Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1шт.; (при необходимости);

10.Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 - 1шт.; (при необходимости);

11.Вкладыш SF3 тюльпан, 10 шт./уп. (при необходимости);

12.Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

13.Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

14.Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

15.Набор для очистки: салфетка, щетка- 1шт.;

16.Футляр пластиковый -1шт.;

17.Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.;

18.Зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 – 1 шт.;

-кабель для зарядки – 1шт.;

-адаптер AC/DC – 1 шт.;

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA- 1 шт.

19.Зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки – 1 шт.;

-адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт.

20.Зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 – 1 шт.

кабель для зарядки –1 шт.

-адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA- 1шт.

Принадлежности:

1.Фильтр серный – 8 шт./уп.;

2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE- 8 шт./уп.

IV. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU560-DRWC, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU560-DRWC(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) -1 шт.;

2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit - 1 шт. (при необходимости);

3. Цветной маркер красный – 1 шт.;

4. Цветной маркер синий – 1 шт.;

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт.(при необходимости);

6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт.(при необходимости);

7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

8. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP - 1 шт.(при необходимости);

9. Звуковод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1шт. (при необходимости);

10. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);

11. Вкладыш SF3 тюльпан, 10 шт./уп. (при необходимости);

12. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

13. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

14. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

15. Набор для очистки: салфетка, щетка- 1 шт.

16. Футляр пластиковый- 1 шт.

17.Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.

18.Зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

- зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 – 1 шт.;
- кабель для зарядки – 1шт.;
- адаптер AC/DC– 1 шт.;
- руководство по эксплуатации на зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA- 1 шт.

19.Зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

- зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 – 1 шт.
- кабель для зарядки – 1 шт.;
- адаптер AC/DC – 1 шт.

: руководство по эксплуатации на зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт. .

20.Зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

- зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 – 1 шт.
- кабель для зарядки –1 шт.
- адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA- 1шт.

Принадлежности:

1.Фильтр серый – 8 шт./уп.;

2.Набор серых фильтров для микрофона в ресивере M&RIE- 8 шт./уп.

V. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU460-DRWC, в составе:

1. Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модель RU460-DRWC(цвет: теплый серый, эспрессо, глубокий черный, графит, золото, бронза, шампань, искрящийся серебряный) – 1 шт.;
2. Программное обеспечение ReSound Smart Fit - 1 шт. (при необходимости);
3. Цветной маркер красный – 1 шт.;
4. Цветной маркер синий – 1 шт.;
5. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип LP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
6. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип MP, размеры: 0,1,2,3,4 – 1 шт. (при необходимости);
7. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип HP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
8. Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP – 1 шт. (при необходимости);
9. Звуковод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
10. Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE, размеры: 0,1,2,3,4 - 1 шт. (при необходимости);
11. Вкладыш SF3 тюльпан - 10 шт./уп. (при необходимости);
12. Вкладыш SF3 мощный, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
13. Вкладыш SF3 открытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);
14. Вкладыш SF3 закрытый, размеры: малый, средний, большой - 10 шт./уп. (при необходимости);

15. Набор для очистки: салфетка, щетка- 1 шт.

16. Футляр пластиковый - 1 шт.;

17. Руководство по эксплуатации на аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями – 1 шт.

18. Зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-1 V3 GEN, CFF6 – 1 шт.;

-кабель для зарядки – 1 шт.;

-адаптер AC/DC- 1 шт.;

- руководство по эксплуатации на Зарядное устройство Premium для слуховых аппаратов OMNIA- 1 шт.

19.Зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 - 1 шт. (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-2 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки– 1 шт.;

-адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на Зарядное устройство Standard для слуховых аппаратов OMNIA – 1 шт.

20.Зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 (при необходимости) в составе:

-зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA, модель C-3 GEN, CFF6 – 1 шт.

-кабель для зарядки –1 шт.

-адаптер AC/DC– 1 шт.

-руководство по эксплуатации на зарядное устройство Desktop для слуховых аппаратов OMNIA- 1шт.

Принадлежности:

1.Фильтр серный – 8 шт./уп.;

2.Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE- 8 шт./уп.

Назначение

Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями, далее по тексту – слуховой аппарат, аппараты или СА предназначен для компенсации потерь слуха путем усиления и передачи звука в ухо.

Условия применения

- Слуховой аппарат предназначен для использования взрослыми и детьми в возрасте 12 лет и старше.
- Слуховой аппарат предназначен для использования непрофессионалами.
- Слуховой аппарат должен быть запрограммирован квалифицированным специалистом-сурдологом.
- Конечный пользователь не должен собирать или устанавливать какие-либо компоненты.
- Слуховой аппарат может использоваться в домашних условиях.

Показания к применению

Нейросенсорная, кондуктивная или смешанная потеря слуха.

Противопоказания

Специалист-сурдолог должен рекомендовать будущему пользователю в кратчайшие сроки проконсультироваться с сертифицированным врачом (желательно специалистом по нарушениям слуха) до настройки слуховых аппаратов, если в результате опроса, фактических наблюдений или получения любой другой информации он установит наличие у будущего пользователя любое из нижеперечисленных состояний:

- видимая врожденная или возникшая в результате травмы деформация уха;
- наличие в анамнезе данных об обильных выделениях из уха в течение предшествующих 90 дней;
- наличие в анамнезе данных о внезапной или стремительной прогрессирующей потере слуха в течение предшествующих 90 дней;
- острые или хронические приступы головокружения;
- внезапная или недавняя односторонняя потеря слуха в течение предшествующих 90 дней;
- костно-воздушный разрыв равен или превышает 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц;
- видимые признаки значительного скопления ушной серы или наличия инородного тела в ушном канале;
- боль или дискомфорт в ухе.

Возможные осложнения и эффекты:

Побочные эффекты от ношения слухового аппарата могут быть следующими:

- Головокружение;
- Тиннитус;
- Субъективно воспринимаемое ухудшение слуха;
- Тошнота;
- Покраснение и раздражение кожи;
- Скопление ушной серы

Предупреждающие знаки:

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на ситуацию, которая может привести к серьезным травмам.
-  **ВНИМАНИЕ:** Указывает на ситуацию, которая может привести к травмам легкой и средней степени тяжести.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендации и советы по оптимизации использования вашего слухового аппарата.

Описание символов, которые используются при маркировке:

Символ	Расшифровка
	Указывает на производителя медицинского устройства, как определено в Директиве ЕС 93/42 / ЕЕС.
	Дата изготовления.
	Номер по каталогу.
	Серийный номер.
	Устройство совместимо с iPhone, iPad, iPod.
	Устройство совместимо с ОС Android.
	Обратитесь к Руководству пользователя
IP	Класс защиты от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды
CARR1	Обозначение типа СА
	После использования необходимо сдать в специализированный пункт утилизации
 0297	Соответствие основным требованиям директив ЕС
	Сертификация АСМА (Австралия).
	Сертификация TELEC (Япония)
	Сертификация MCMC (Малайзия)

	Сертификация в США
	Сертификация в Корее
	Уникальный идентификационный номер устройства (UDI). Он позволяет однозначно идентифицировать конкретное медицинское изделие на рынке ЕС.
	Знак указывает на то, что продукт является медицинским изделием, и помогает идентифицировать его как таковое на рынке ЕС.
(01)05708296250172	Знак GTIN – международный код маркировки и учёта логистических единиц;
	Код партии.
	Произведено в Китае.
	Беречь от солнечных лучей.
	Изделие предназначено только для использования в помещениях
	Класс защиты от поражения электрическим током II
	Изделие является рабочей частью типа В.
Input: 100-240V 50/60 Hz 5,0V, 0,2A	Переменный ток от 100 до 240 Вольт частота 50-60Гц Вход: 5,0 вольт 0,2 Ампер
Out: 5,0V=1,0A 5,0 W	Выход: 5,0 вольт =1,0 амперу 5,0 Ватт
	Знак «вверх»
	«Хрупкое Осторожно»
	Знак Bluetooth
	Устройство использует радиочастотную электромагнитную энергию
	«Беречь от влаги»

Ознакомление со слуховым аппаратом

Слуховой аппарат



* На иллюстрации изображен открытый вкладыш. Используемый вами вкладыш может выглядеть иначе.


Ушные вкладыши



Вкладыш-тюльпан



Закрытый вкладыш

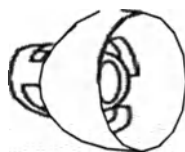

Открытый вкладыш



Мощный вкладыш



Индивидуальный вкладыш


Все вкладыши — светло-серые

Ресиверы



У ресивера может быть микрофон, как показано здесь.

Спортивный замок

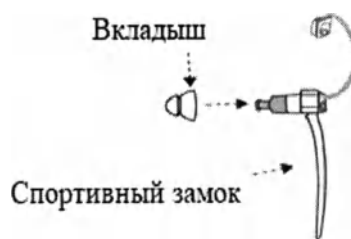

Спортивный замок удерживает слуховые аппараты на месте, когда вы активно двигаетесь.

Подготовка слуховых аппаратов к использованию

Предупреждение о батарейках

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перезаряжаемые слуховые аппараты оснащены несъемным литий-ионным аккумулятором (аккумуляторными батарейками). Их проглатывание или воздействие используемых в них веществ может нанести серьезный вред.
- Ни в коем случае не кладите перезаряжаемый слуховой аппарат в рот.
- Храните перезаряжаемый слуховой аппарат вне досягаемости для домашних животных, детей и лиц с нарушениями умственного развития, когнитивных функций и психического здоровья.
- Ни в коем случае не проглатывайте литий-ионные аккумуляторы и не помещайте их внутрь тела, так как это может привести к смертельным травмам в течение двух часов или менее. В случае проглатывания или попадания литий-ионного аккумулятора в любую часть тела либо проглатывания перезаряжаемого слухового аппарата немедленно обратитесь к врачу.
- Если наружный корпус перезаряжаемого слухового аппарата поврежден, аккумуляторные батарейки могут протекать. В таком случае не пытайтесь использовать слуховой аппарат — обратитесь к специалисту-сурдологу.
- Утечка из батареек может стать причиной химических ожогов. В случае контакта с веществом, вытекающим из батареек, незамедлительно промойте теплой водой пораженный участок. В случае появления химических ожогов, покраснения или раздражения на коже от контакта с веществом, вытекшим из батареек, необходимо обратиться за медицинской помощью.
- Батарейки вредны для окружающей среды. Поэтому, ни в коем случае не пытайтесь их сжечь — утилизируйте отработанные перезаряжаемые батарейки в соответствии с региональными нормативными требованиями или верните их специалисту-сурдологу.
- Из соображений безопасности используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с вашим слуховым аппаратом.
- Если вы собираетесь в путешествие, проконсультируйтесь с авиакомпанией о правилах транспортировки зарядного устройства и слуховых аппаратов.

Зарядка слуховых аппаратов

Мы рекомендуем полностью зарядить слуховые аппараты перед использованием. Это просто мера предосторожности, позволяющая не допустить внезапного отключения питания. Чтобы узнать, как заряжать слуховые аппараты, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством к зарядному устройству для слуховых аппаратов.

Сигнал низкого заряда батареек

Если батарейки разряжены, каждые 15 минут громкость в слуховых аппаратах будет кратковременно снижаться и будет проигрываться мелодия, пока не прекратится подача питания. Затем слуховые аппараты отключатся.

Сигнал низкого заряда батарейки при сопряжении с беспроводными аксессуарами

ПРИМЕЧАНИЕ:

Батарейки разряжаются быстрее, если используются функции, работающие по беспроводной связи, например потоковая передача аудиоданных с мобильного устройства или телевизора посредством нашего ТВ-стримера. По мере уменьшения заряда батарейки постепенно отключаются функции, работающие по беспроводной связи. В качестве индикатора низкого заряда батарейки каждые пять минут будет звучать короткая мелодия. В таблице внизу показаны функциональные возможности при разных уровнях заряда батарейки.

Уровень заряда батареи	Сигнал	Слуховой аппарат	Пульт дистанционного управления	Потоковая передача данных
Устройство полностью заряжено		✓	✓	✓
Низкий уровень заряда батарейки	 Четыре одинаковых звуковых сигнала	✓	✓	х
Батарейка разряжена	 Три одинаковых звуковых сигнала и один длинный звуковой сигнал	✓	х	х

Они снова будут работать, когда вы зарядите слуховой аппарат.

Вы можете проверить уровень заряда батарейки, разместив слуховой аппарат в зарядном устройстве для слуховых аппаратов. (только зарядное устройство премиум-класса). Уровень заряда батарейки можно также проверить в приложении ReSound Smart 3D.

Размещение слуховых аппаратов в ушах

Как различать правый и левый слуховые аппараты

Левый слуховой аппарат (синяя маркировка)



Правый слуховой аппарат (красная маркировка)



ВНИМАНИЕ: Если у вас два слуховых аппарата, они могут быть запрограммированы по-разному.

Не меняйте их местами, так как это может повредить слух.

Ваши слуховые аппараты отмечены цветовой маркировкой. Левый = синий. Правый = красный.

Если у ваших слуховых аппаратов нет цветовой маркировки, попросите специалиста-сурдолога нанести ее.

Размещение вкладыша ресивера в ухе

Если на ваших слуховых аппаратах установлены колпачки, следуйте этим инструкциям:



1. Установите слуховой аппарат сверху на ухо.



2. Удерживая трубочку ресивера в месте сгиба, осторожно разместите вкладыш ресивера в ушном канале, аккуратно продвинув вкладыш ресивера в ушной канал



3. Разместите вкладыш достаточно глубоко в ушном канале таким образом, чтобы расположить провод вплотную к голове. Чтобы проверить расположение, воспользуйтесь зеркалом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание появления свиста важно, чтобы трубка и вкладыш были правильно размещены в ухе. Если свист будет по-прежнему слышен, посмотрите в руководстве по устранению неполадок, какие еще причины могут быть у этого явления, и как их устранить.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь согнуть тонкий провод или изменить его форму.

Спортивный замок

Если вы очень активно двигаетесь, слуховые аппараты могут сместиться из надлежащего положения. Чтобы этого не случилось, специалист-сурдолог может прикрепить к ресиверу спортивный замок и отрегулировать его.

Чтобы разместить слуховой аппарат со спортивным замком:


1. Разместите слуховой аппарат в ухе как обычно
2. Продвиньте спортивный замок в нижнюю часть ушной раковины (часть уха, находящаяся непосредственно перед ушным каналом)



ПРИМЕЧАНИЕ: Со временем спортивные замки могут стать жесткими или хрупкими, а их цвет может измениться. Для выполнения замены обратитесь к специалисту-сурдологу. Специалист-сурдолог поможет вам выполнить замену

Размещение ушных вкладышей в ушах

Если на ваших слуховых аппаратах установлены ушные вкладыши, следуйте этим инструкциям:

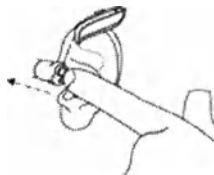

1. Удерживая ушной вкладыш большим и указательным пальцами, разместите его в ухе, направляя звуковой выход в ушной канал.

2. Аккуратными вращательными движениями продвиньте ушной вкладыш в ухо. Двигайте ушной вкладыш вверх-вниз и осторожно нажмите на него. Чтобы облегчить процедуру размещения слухового аппарата в ухе, можно открывать и закрывать рот.


3. Разместите слуховой аппарат за ухом так, чтобы он был надежно закреплен. Если слуховые аппараты размещены правильно, они сидят плотно, не причиняя дискомфорта.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке вкладыша может помочь оттягивание уха вверх и назад противоположной рукой.


Извлечение слуховых аппаратов из ушей

Извлечение вкладышей ресивера из ушей

Если на ваших слуховых аппаратах установлены колпачки, следуйте этим инструкциям:

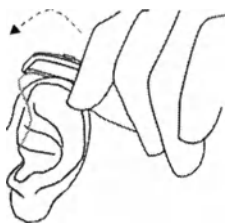

Приподнимите слуховой аппарат над ухом.

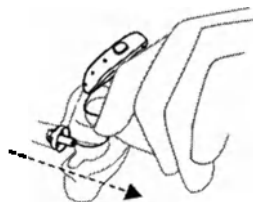

2. Удерживая трубку ресивера в месте сгиба большим и указательным пальцами, извлеките вкладыш из ушного канала

Извлечение ушных вкладышей из ушей

Если на ваших слуховых аппаратах установлены ушные вкладыши, следуйте этим инструкциям:



1. Приподнимите слуховой аппарат за ухом. ненадолго оставьте его в приподнятом положении возле уха.



2. Возьмите ушной вкладыш большим и указательным пальцами и аккуратно извлеките его (но только не сам слуховой аппарат и не трубку) из уха. Если на ушном вкладыше есть леска для извлечения аппарата, аккуратно потяните за эту леску. Леска для извлечения аппарата фиксируется на ушном вкладыше по запросу пользователя слухового аппарата. Полностью извлеките вкладыш, аккуратно выполняя вращательные движения.

Использование слуховых аппаратов

Включение и выключение слуховых аппаратов

Чтобы включить или выключить слуховые аппараты, нажмите кнопку программ и удерживайте ее нажатой в течение пяти секунд.

Удерживание этой кнопки нажатой в течение другого времени активирует другие функции, такие как «Авиарежим» и «Потоковая передача аудиоданных». Они описаны в других разделах данного руководства.

Ваши слуховые аппараты автоматически переключаются в режим ожидания в момент их размещения во включенном зарядном устройстве и автоматически включаются в момент их извлечения из него.

Слуховые аппараты всегда начинают работать на программе 1 и предварительно заданном уровне громкости.



И **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в зарядном устройстве нет встроенной батареи (то есть настольное или стандартное зарядное устройство) и оно отключено от источника питания во время использования, то слуховые аппараты в зарядном устройстве выключаются.

Описание индикаторов на слуховом аппарате:

- Одна вспышка зеленым светом в течение 2 секунд: Слуховой аппарат включается и находится в рабочем режиме.
- Три вспышки зеленым светом длительностью 1 секунда: Слуховой аппарат выключается.
- Если слуховой аппарат установлен в зарядном устройстве, зеленые световые индикаторы мигают: Слуховой аппарат заряжается.
- Если слуховой аппарат установлен в зарядном устройстве, зеленые световые индикаторы постоянно горят: Слуховой аппарат полностью заряжен.

Smart Start

Smart Start обеспечивает задержку включения слухового аппарата после извлечения слухового аппарата из зарядного устройства. Если эта функция активирована, каждая секунда задержки (5- или 10-секундная задержка) сопровождается звуковым сигналом.

Smart Start задерживается, когда звук проходит через слуховой аппарат. Это даст вам время, чтобы надеть слуховой аппарат без появления свиста или других проблем.

И **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не хотите использовать эту функцию, попросите специалиста-сурдолога отключить ее.

Акустические программы

Ваш специалист-сурдолог может активировать одну или несколько акустических программ в слуховых аппаратах. Эти программы могут помочь вам в определенных ситуациях. Узнайте у специалиста-сурдолога, какие программы могут быть полезными для вас

Программы	Использование
All-Around	Лучший вариант, если вы хотите использовать только одну программу.
Front Focus/Ultra Focus	Программа для использования в очень шумных местах (более сфокусирована, чем программа «Ресторан»).
Ресторан	Программа для использования в шумных местах, например в ресторанах или на общественных мероприятиях.
Музыка	Программа для использования во время прослушивания музыки.
Акустический телефон	Специальная программа для использования во время телефонных разговоров.
На улице	Программа для использования вне помещений (для снижения шума ветра).

Приложения

У нас есть приложение, которое вы можете использовать для управления слуховыми аппаратами. Вы можете использовать приложение, чтобы регулировать громкость, переключать программы и выполнять потоковую передачу аудиоданных с другого устройства. См. "Дополнительные опции".



Переключение программ


- Нажмите эту кнопку, чтобы переключить программу с одной на другую. В подтверждение переключения программы в слуховых аппаратах подается звуковой сигнал. Количество звуковых сигналов обозначает то, какую программу вы выбрали.
- Чтобы вернуться к заданной по умолчанию акустической программе, пролистайте до нее или выключите слуховые аппараты, а затем снова включите их.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас два слуховых аппарата, на которых активирована синхронизация, при переключении программы в одном слуховом аппарате автоматически переключается программа и во втором слуховом аппарате.

Потоковая передача звука в ваши слуховые аппараты

Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение трех секунд. Слуховые аппараты начнут выполнять потоковую передачу звука с выбранного вами аудиоустройства.

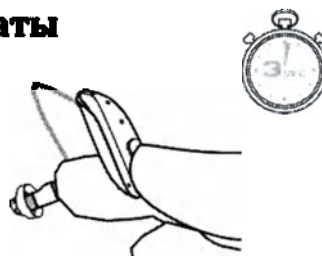

Прежде чем вы сможете начать потоковую передачу аудиоданных в слуховые аппараты, вы должны выполнить их сопряжение с аудиоустройством. Более подробную информацию о том, как это сделать, можно найти в инструкциях по использованию вашего аудиоустройства.

Использование телефона

Ваш слуховой аппарат дает вам возможность использовать телефон привычным образом. Некоторым пользователям слуховых аппаратов необходимо попрактиковаться, прежде чем они смогут определить для себя оптимальное положение телефона.



В этом могут помочь нижеперечисленные рекомендации:

1. Поднесите телефон к ушному каналу или микрофону слухового аппарата, как показано на иллюстрации.
2. Если вы слышите свист, попробуйте подержать телефон в одном и том же положении в течение нескольких секунд. Слуховой аппарат может выполнить подавление свиста.

Также можно попробовать подержать телефон на небольшом расстоянии от уха.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если у вас есть мобильное устройство, вы можете выполнить его сопряжение, чтобы подключить его напрямую к вашим слуховым аппаратам. См. "Дополнительные опции", стр. 29.
- Если добиться удовлетворительных результатов при использовании мобильного телефона не удастся, специалист-сурдолог может порекомендовать беспроводные аксессуары, которые улучшают качество общения по мобильному телефону. См. также "Беспроводные аксессуары".
- В зависимости от ваших потребностей специалист-сурдолог может активировать программу, специально предназначенную для использования телефона.

Мобильные телефоны

Ваши слуховые аппараты соответствуют строжайшим стандартам международной электромагнитной совместимости. Могут возникать помехи различной интенсивности, которая зависит от особенностей вашего мобильного телефона или работы провайдера услуг беспроводной связи.

Дополнительные опции

Использование слуховых аппаратов с iPhone, iPad и iPod touch (опция)

В слуховых аппаратах предусмотрена функция Made for iPhone, iPad и iPod touch, которая позволяет осуществлять прямую потоковую передачу аудиоданных, в том числе выполнение hands-free телефонных звонков с новейшими моделями iPhone и iPad¹, и для управления с помощью этих мобильных устройств.

Потоковая передача аудиоданных со смартфона на базе Android

Некоторые смартфоны Android могут осуществлять потоковую передачу аудиоданных, в том числе телефонные звонки, напрямую в слуховые аппараты. Для этого необходимо использовать смартфон на базе операционной системы Android 10 или более новой версии, в котором также есть функция Android Streaming for Hearing Aids.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения помощи в сопряжении и использовании этих устройств со слуховыми аппаратами, пожалуйста, обратитесь к специалисту-сурдологу.

Hands-free звонки совместимы с iPhone 11 или более поздней версии, iPad Pro 12,9 дюйма (5-е поколение), iPad Pro 11 дюймов (3-е поколение), iPad Air (4-е поколение) и iPad mini (6-е поколение) или более нового поколения с обновлениями программного обеспечения iOS 15.3 и iPadOS 15.3 или более поздней версии.

Управление слуховым аппаратом с помощью мобильного приложения (опция)

Приложение ReSound Smart 3D передает сигналы между слуховыми аппаратами и мобильными устройствами. Вы можете использовать приложение ReSound Smart 3D, разработанное для ваших слуховых аппаратов, чтобы получать обновления для слуховых аппаратов, выполнять поиск слуховых аппаратов, проверять состояние их батареек, а также удаленно изменять программы или регулировать громкость.

ВНИМАНИЕ:

- Подключайте ваш слуховой аппарат только к официальному ReSound мобильному приложению.
- Приложение должно использоваться только со слуховыми аппаратами ReSound, для которых оно предназначено. Компания ReSound не несет ответственность в случае, если приложение используется с другими слуховыми аппаратами.
- Не отключайте уведомления в приложении.
- Устанавливайте обновления для того, чтобы поддерживать надлежащее функционирование приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы получить печатную версию руководства пользователя для приложения, посетите наш веб-сайт (см. последнюю страницу этого руководства) или обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Для получения помощи в сопряжении и использовании этих устройств со слуховыми аппаратами, обратитесь к специалисту-сурдологу или посетите наш веб-сайт, на котором приведена необходимая информация..
- Если ваше мобильное устройство на базе Android с поддержкой Bluetooth не выполняет потоковую передачу звука напрямую в слуховые аппараты, вы можете использовать ReSound Phone Clip+, который дает возможность передавать звуки с мобильного устройства в слуховые аппараты и совершать телефонные разговоры по беспроводной связи.

ReSound Assist и ReSound Assist Live (опция)

ReSound Assist

Если вы зарегистрировались для использования функции ReSound Assist, доступной для ваших слуховых аппаратов, вы можете разрешить дистанционную настройку ваших слуховых аппаратов без необходимости посещать специалиста-сурдолога.

Все, что для этого необходимо, — это совместимое мобильное устройство с доступом в сеть Интернет. Это позволяет:

- Вы можете дистанционно запросить настройку ваших слуховых аппаратов в соответствии с вашими потребностями.

Чтобы оптимизировать работу ваших слуховых аппаратов, вы можете обновлять их, используя новейшие версии программного обеспечения.

Данная услуга доступна, только если ваше мобильное устройство подключено к сети Интернет. Специалист-сурдолог предоставит вам информацию об этой опции и о том, как она работает с приложением ReSound Smart 3D.

Чтобы обновление прошло максимально эффективно, перед тем как выполнить его, убедитесь, что слуховые аппараты подключены к приложению ReSound Smart 3 и находятся возле смартфона или планшета (iPhone, iPad, iPod touch или Android).

И ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе установки и обновления слуховые аппараты отключаются. ReSound Assist Live

Эта услуга также включает в себя ReSound Assist Live. Пользуясь этой услугой, вы можете получить индивидуальную помощь специалиста-сурдолога, не выходя из дома.



Phone Now (опция)

Если разместить на телефонной трубке специальный магнит, ваши слуховые аппараты будут автоматически переключаться на программу для телефона, когда телефонная трубка будет находиться возле уха.

Если пользователь убирает телефонную трубку от уха, слуховые аппараты автоматически переключаются обратно на предыдущую программу.

И ПРИМЕЧАНИЕ: Попросите специалиста-сурдолога активировать Phone Now в ваших слуховых аппаратах.


Предупреждения касательно использования Phone Now

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Проглатывание магнита может нанести вред здоровью. В случае проглатывания магнита необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Храните магниты вне досягаемости от домашних животных, детей и лиц с нарушениями умственного развития, когнитивных функций и психического здоровья. Магнит Phone Now может отрицательно повлиять на работу высокочувствительных медицинских устройств/электронных систем. Если вы используете функцию Phone Now вблизи подобных высокочувствительных приборов/оборудования (например, кардиостимуляторов и дефибрилляторов), вам необходимо обратиться к их производителю для получения рекомендаций касательно надлежащих мер безопасности, которые необходимо соблюдать в такой ситуации. Если производитель не может предоставить соответствующие рекомендации, мы советуем держать магнит или телефон, оснащенный магнитом, на расстоянии 30 см (12 дюймов) от устройств, чувствительных к воздействию магнитного поля (например, кардиостимуляторов).

Размещение магнита Phone Now

Разместите магнит на телефонной трубке следующим образом:

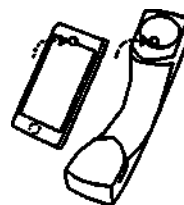

Тщательно очистите поверхность. Используйте рекомендуемое очищающее средство.

2. Снимите фольгу с магнита.

3. Разместите магнит на телефоне

ВНИМАНИЕ:

- Если во время использования телефона часто пропадает сигнал или возникает шум, переместите магнит Phone Now в другое место на телефонной трубке.
- Используйте только магниты, поставляемые ReSound.

Использование Phone Now

1. Поднесите телефон к уху.

2. Если вы услышали короткую мелодию, это значит, что активирована программа телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Возможно, вам потребуется немного сместить телефонную трубку, чтобы найти наилучшее положение для обеспечения надежной активации функции Phone Now и хорошей слышимости при использовании телефона.
- Если в ваших слуховых аппаратах активирована функция Comfort Phone, в момент, когда телефон подносится к уху, в слуховом аппарате на втором ухе автоматически уменьшается громкость звука.
- Не закрывайте магнитом отверстие динамика на телефоне..
- Если использование этой функции не приносит удовлетворительного результата, переместите магнит в другое положение, чтобы сделать процесс общения более простым и комфортным.

Если слуховые аппараты не переключаются на программу телефона каждый раз в случае необходимости, попробуйте изменить местоположение магнита или добавить дополнительные магниты.

Авиарежим / Режим отключения беспроводной связи (опция)

Ваши слуховые аппараты могут принимать беспроводные сигналы. Например, ими можно управлять посредством мобильного устройства или пульта дистанционного управления. Между вашими слуховыми аппаратами также может происходить обмен информацией. Однако в некоторых местах необходимо отключать беспроводную связь.

ВНИМАНИЕ:

- Этот слуховой аппарат оснащен радиочастотным передатчиком. При посадке в самолет следуйте установленным авиакомпанией предписаниям и выключите функцию беспроводной связи в слуховых аппаратах в необходимый момент и необходимым способом.
- В ситуациях, когда это необходимо, выключайте функцию беспроводной связи в слуховых аппаратах.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы должны выполнить нижеуказанные действия для обоих слуховых аппаратов, даже если активирована функция синхронизации.

Отключение беспроводной связи (активация авиарежима)

1. Выключите слуховой аппарат.
2. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 9 секунд.
3. Ваш слуховой аппарат дважды мигнет четыре раза. Если в это время вы используете слуховые аппараты, вы услышите двойные тона (дл) в течение около 10 секунд, означающие переключение слухового аппарата в авиарежим.

Активация беспроводной связи (отключение авиарежима)

1. Выключите слуховой аппарат, а затем снова включите его.
2. Режим беспроводной связи будет активирован в течение 10 секунд

Очистка слуховых аппаратов и уход за ними

Инструменты для очистки

В комплекте со слуховыми аппаратами поставляются следующие инструменты для очистки:



1. Мягкая тряпочка.



2. Щеточка с магнитом для батареек.


Специалист-сурдолог может предоставить вам набор серных фильтров

Общие инструкции по уходу и техническому обслуживанию

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить высокое качество использования ваших слуховых аппаратов и максимально продлить их срок службы, необходимо очищать слуховые аппараты и проводить мероприятия по уходу за ними.

Поддерживать слуховые аппараты в идеальном рабочем состоянии легко. Просто выполняйте следующее:

1. После того, как слуховые аппараты были извлечены, выключите их.
2. После извлечения слуховых аппаратов протрите их мягкой тряпочкой, чтобы они были чистыми и сухими.
3. Если вы используете поглотитель влаги, используйте только рекомендуемые средства.
4. Наносите косметику, духи, лосьон после бритья, лак для волос, лосьоны и т. д. **ПЕРЕД** тем, как надеть слуховые аппараты. Эти средства могут повредить слуховые аппараты или изменить их цвет.
5. Ни в коем случае не погружайте слуховой аппарат в жидкость.
6. Не подвергайте слуховые аппараты воздействию чрезмерно высоких температур и прямых солнечных лучей.
7. Не плавайте, не принимайте душ и не посещайте баню/сауну в слуховых аппаратах.
8. Устройство сертифицировано по стандарту IP68 для защиты от воды и пыли:
 - Устройство имеет степень защиты IP6X от проникновения пыли. Не допускайте попадания на устройство большого количества пыли.

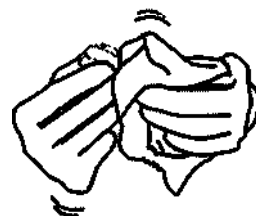

Устройство имеет степень защиты IPX8 от проникновения воды. Избегайте контакта устройства с водой. Не плавайте, не принимайте душ и не посещайте сауну во время ношения устройства.

ВНИМАНИЕ:


- Наличие на слуховых аппаратах ушной серы или других загрязнений может стать причиной возникновения инфекции. Во избежание этого очищайте слуховые аппараты согласно инструкциям.

Ежедневный уход и техническое обслуживание

Важно ежедневно поддерживать слуховые аппараты в чистом и сухом состоянии. Используйте инструменты для очистки, поставляемые в комплекте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ни в коем случае не допускайте попадания очистительной проволоки или ворсинок щеточки во входные отверстия микрофона. Это может повредить ваши слуховые аппараты.
- Не используйте воду для очистки трубочек ресивера или вкладышей.
- Протирайте ресиверы и вкладыши мягкой, сухой тряпочкой.

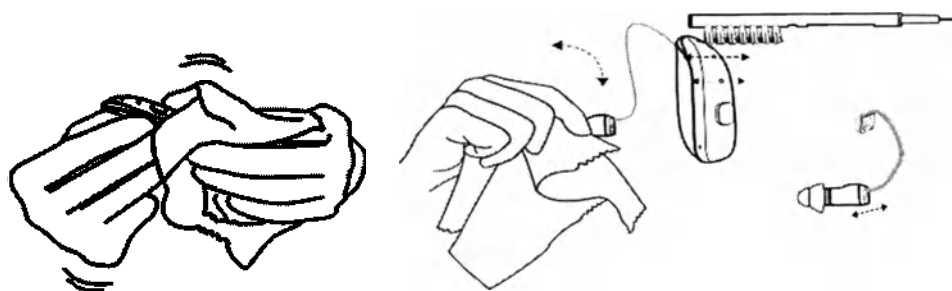

Очистка, дезинфекция

Наденьте одноразовые нитриловые перчатки.

Смочите мягкую ткань 70-90 % - ным спиртовым раствором (изопропиловый, метиловый или этиловый спирт) с 10-30% - ной очищенной водой.

Тщательно протрите слуховой аппарат тканью до тех пор, пока не останется никаких следов грязи. Затем выбросьте тряпку в мусорное ведро.

Возьмите новую тряпку и смочите ее спиртовым раствором. Аккуратно очистите слуховой аппарат еще раз, в течение 60 секунд, убедившись, что все поверхности очищены спиртовым раствором.

Не погружайте слуховой аппарат в спиртовой раствор или любую другую жидкость.

Выбросьте тряпку и перчатки в мусорное ведро.

Поместите слуховой аппарат на чистую поверхность на несколько минут до полного высыхания.

Важно ежедневно поддерживать слуховые аппараты в чистом и сухом состоянии. Используйте инструменты для очистки, поставляемые в комплекте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прижимайте с силой волоски щеточки к входам, так как это может привести к повреждению микрофонов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте проволочную петлю для очистки входных отверстий микрофона. Если входные отверстия микрофона остались засоренными после очистки наружной поверхности щеточкой, попросите специалиста-сурдолога помочь вам очистить их.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проволочная петля предназначена только для ушных вкладышей.

Замена вкладышей в слуховых аппаратах


Мы рекомендуем, чтобы специалист-сурдолог показал вам, как менять вкладыши. Вкладыши необходимо менять раз в 3 месяца или чаще, в зависимости от рекомендаций специалиста-сурдолога. Неправильная замена вкладыша может привести к тому, что он останется в ухе при извлечении слухового аппарата.

ВНИМАНИЕ:


- Если вы подозреваете, что вкладыш застрял у вас в ухе, обратитесь к специалисту-сурдологу. Эти предметы могут нанести вред и стать причиной возникновения инфекции в ухе.
- Используйте только аксессуары, предназначенные для использования с вашими слуховыми аппаратами. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.

Стандартные вкладыши

На иллюстрациях изображен открытый вкладыш, но процедура одинакова и для всех остальных вкладышей. Чтобы заменить вкладыши, следуйте этим инструкциям.

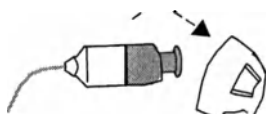


1. Извлеките использованный вкладыш, сняв его с ресивера, и утилизируйте его. Возможно, потребуется приложить усилие.

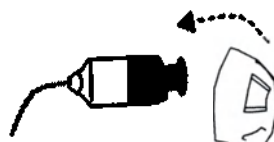

2. Наденьте новый вкладыш на рельефный край ресивера




1. Убедитесь, что вкладыш установлен правильно. Для этого аккуратно приподнимите нижнюю часть вкладыша и проверьте, полностью ли кайма вкладыша закрывает рельефный край ресивера.

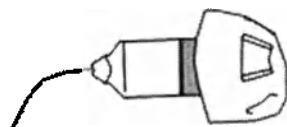

2. При правильном размещении кажется, что вкладыш расположен немного под углом.

Вкладыши-ТЮЛЬПАНЫ

Чтобы выполнить замену вкладыша-тюльпана, следуйте этим инструкциям

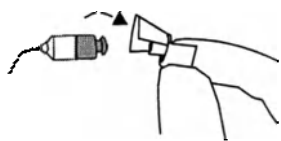


1. Извлеките использованный вкладыш, сняв его с ресивера, и утилизируйте его. Возможно, потребуется приложить



усилие.

2. Отодвиньте самый большой сегмент назад, затем прижмите вкладыш-тюльпан к ребристому краю ресивера

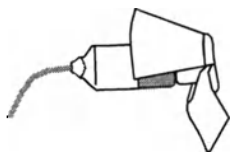

3. Убедитесь в правильности установки вкладыша-тюльпана, проверив, полностью ли кайма вкладыша закрывает ребристый край ресивера.



4. Сдвиньте большой лепесток вперед.




На этой иллюстрации изображен правильно установленный вкладыш-тюльпан. Убедитесь в том, что большой лепесток находится за пределами маленького лепестка

Замена серного фильтра

Серный фильтр предотвращает контакт ушной серы с компонентами слухового аппарата. Серный фильтр необходимо регулярно менять. Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом по поводу того, как часто это необходимо делать. Это зависит от того, сколько ушной серы образуется у вас в ушах.

Если вы носите вкладыш, снимите его, прежде чем выполнять замену серного фильтра. Вам понадобится коробка с инструментами для замены серных фильтров.

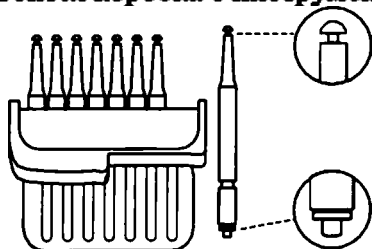


Коробка с восемью инструментами для замены серных фильтров.

Инструмент для установки и извлечения серных фильтров выполняет две функции: извлечение отработанных серных фильтров и их замена на новые серные фильтры.

Извлечение старого серного фильтра



1. Снимите вкладыш с ресивера

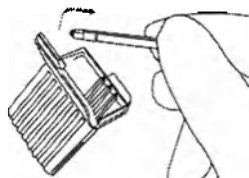

2. Откройте футляр с серными фильтрами и достаньте один из инструментов для их замены. У каждого инструмента есть маленький крючок с одной стороны и новый серный фильтр с другой



3. Вставьте наконечник для удаления в использованный серный фильтр, а затем сразу же вытащите его наружу. Важно вытянуть инструмент, удерживая его прямо, а не под углом

Беспроводные аксессуары

Экосистема наших беспроводных устройств включает в себя широкий ассортимент беспроводных аксессуаров, слаженно функционирующих совместно со слуховыми аппаратами. Использование таких аксессуаров позволяет осуществлять потоковую передачу высококачественных стереозвуков и речи напрямую в слуховые аппараты.

Доступные беспроводные аксессуары и их характеристики

- **ТВ-стример** осуществляет потоковую передачу аудио из телевизора и большинства других источников аудио в ваши слуховые аппараты, поддерживая необходимый вам уровень громкости.
- **Базовый пульт дистанционного управления** регулирует громкость, отключает звук в слуховых аппаратах и переключает программы.
- **Пульт дистанционного управления с расширенными возможностями** регулирует громкость, отключает звук в слуховых аппаратах, переключает программы и отображает настройки.
- **Телефонная гарнитура** осуществляет потоковую передачу телефонных разговоров и стереозвуков в оба слуховых аппарата, а также может использоваться в качестве пульта управления.
- **Выносной микрофон** представляет собой микрофон, который носит собеседник. Его использование значительно улучшает понимание речи в условиях шума.
- **Беспроводной выносной микрофон** работает как настольный микрофон, а также может использоваться в качестве настольного микрофона. Кроме того, он имеет встроенную индукционную катушку, которая позволяет подключаться к системе индукционной петли, коннектору для FM-приемника и входу с разъемом «мини-джек» для проводной потоковой передачи аудиоданных с компьютера или музыкального плеера.
 - Приложение, которое можно установить на мобильное устройство для потоковой передачи данных и управления аппаратами непосредственно с мобильного устройства. См. "Дополнительные опции".

Получение доступа к беспроводным аксессуарам

Чтобы получить доступ к беспроводному устройству, которое уже сопряжено со слуховыми аппаратами, нажмите и удерживайте кнопку программ не более 2 секунд. Слуховой аппарат издаст звук для подтверждения соединения.

Информацию о том, как выполнить сопряжение слуховых аппаратов с беспроводным аксессуаром, см. в руководстве по использованию соответствующего беспроводного аксессуара.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, обратитесь к специалисту-сурдологу, чтобы ознакомиться с совместимыми беспроводными аксессуарами, одобренными GN ReSound A/S.

С вашими беспроводными слуховыми аппаратами вы должны использовать только ReSound беспроводные аксессуары.

Борьба с тиннитусом

Модуль Tinnitus Sound Generator

Ваш слуховой аппарат ReSound оснащен модулем Tinnitus Sound Generator (TSG) — средством, генерирующим звуки, которые используются в программах по борьбе с тиннитусом с целью временного облегчения его симптомов. TSG может генерировать звуки, соответствующие определенным терапевтическим целям или вашим личным предпочтениям, и используется по назначению врача, аудиолога или специалиста-сурдолога. В зависимости от выбранной программы слухового аппарата и среды, в которой вы находитесь, вы иногда будете слышать терапевтические звуки, которые напоминают постоянный или прерывистый шум.

Показания для использования модуля TSG

Модуль Tinnitus Sound Generator — это устройство, генерирующее звуки, которые используются в рамках программы борьбы с тиннитусом для временного облегчения состояния пациентов, страдающих тиннитусом. Целевую категорию составляют взрослые в возрасте старше 18 лет. Кроме того, данное изделие можно использовать для детей в возрасте 12 лет и старше. Однако дети и лица с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития должны быть обучены процедуре размещения и извлечения слухового аппарата с модулем TSG. Обучение этой процедуре должен выполнять врач, аудиолог, специалист-сурдолог или опекун.

Для медицинских работников

Модуль Tinnitus Sound Generator используется медицинскими работниками, которые специализируются на лечении пациентов с тиннитусом и обычными нарушениями слуха. Первоначальная настройка модуля Tinnitus Sound Generator должна быть выполнена сурдологом, участвующим в программе по борьбе с тиннитусом, в ходе очного приема. Если специалист-сурдолог сочтет это целесообразным, последующую настройку модуля Tinnitus Sound Generator можно выполнить дистанционно в режиме реального времени, при этом обмениваясь информацией посредством аудио, видео и чата в специализированном пользовательском приложении.

Инструкции по использованию модуля TSG

Описание устройства

Модуль Tinnitus Sound Generator (TSG) — это программное средство, генерирующее звуки, которые используются в программах для борьбы с тиннитусом с целью временного облегчения его симптомов.

Принцип работы устройства

Модуль TSG — это устройство, генерирующее частотно-амплитудный белый шум. Уровень сигнала шума и частотные характеристики могут регулироваться в соответствии с терапевтическими целями согласно назначению врача, аудиолога или специалиста-сурдолога.

Врач, аудиолог или специалист-сурдолог могут модулировать генерируемый шум для того, чтобы сделать его более комфортным для восприятия. Шум можно менять таким образом, чтобы он напоминал, к примеру, звук волн, набегающих на берег.

Скорость и уровень модуляции также можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Специалист-сурдолог может активировать дополнительную функцию, которая позволяет выбирать предварительно заданные звуки, имитирующие звуки природы, например шум волн или текущей воды. Если вы используете два беспроводных слуховых аппарата, которые поддерживают бинауральную синхронизацию, эту функцию может активировать специалист-сурдолог. При этом Tinnitus Sound Generator синхронизирует звук в обоих слуховых аппаратах. Если тиннитус беспокоит вас только в условиях тишины, врач, аудиолог или специалист-сурдолог могут настроить модуль TSG таким образом, чтобы генерируемый им звук был слышен только в тишине.

Общий уровень звука можно настраивать с помощью регулятора громкости, который является опциональным. Необходимость использования такого регулятора устанавливается совместно с врачом, аудиологом или специалистом-сурдологом.

На слуховых аппаратах с активированной функцией бинауральной синхронизации сурдолог также может активировать функцию синхронизации мониторинга окружения для того, чтобы уровень шума TSG, автоматически регулировался одновременно в обоих слуховых аппаратах в зависимости от уровня фоновых звуков. Помимо этого, если слуховой аппарат оснащен регулятором громкости, уровень окружающего шума отслеживается слуховым аппаратом, и регулятор громкости может одновременно использоваться для регулировки уровня генерируемого шума в обоих слуховых аппаратах.

Научные концепции, которые легли в основу функционирования устройства

Функция модуля TSG заключается в том, чтобы отвлечь от звука, возникающего при тиннитусе, нейтральным звуком, который пользователь может с легкостью игнорировать. Отвлечение внимания является важным компонентом большинства методов борьбы с тиннитусом, например терапии привыкания к тиннитусу.

Генерируемый звук должен быть слышимым, поскольку это необходимо для привыкания к тиннитусу. Поэтому идеальная громкость модуля TSG должна быть настроена так, чтобы генерируемый звук начинал сливаться со звуком, возникающим при тиннитусе, и пользователь слышал и звук, возникающий при тиннитусе, и звук, производимый звуковым генератором.

В большинстве случаев модуль TSG также можно настроить таким образом, чтобы он маскировал звук, возникающий при тиннитусе, и обеспечивал пользователю временное облегчение, генерируя более комфортный и контролируемый звук.

Регулировка громкости TSG

Специалист-сурдолог настраивает звуковой генератор на определенный уровень громкости. При включении звукового генератора громкость устанавливается на данном оптимальном уровне. Поэтому регулировка громкости вручную может не понадобиться. Однако с помощью регулятора

громкости пользователь может настраивать уровень громкости или интенсивность стимула в соответствии со своими предпочтениями. Громкость звукового генератора тиннитуса можно регулировать только в диапазоне, заданном специалистом-сурдологом.

Регулятор громкости — это опция для модуля TSG, используемая для настройки уровня мощности звукового генератора.

Использование TSG с мобильными приложениями

Управление звуковым генератором тиннитуса посредством кнопок программ на слуховых аппаратах можно оптимизировать, используя беспроводное управление с помощью специального приложения TSG, устанавливаемого на смартфон или другое мобильное устройство. Эта возможность появляется в поддерживаемых слуховых аппаратах после того, как специалист-сурдолог активирует функцию TSG во время настройки слухового аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования мобильных приложений слуховой аппарат должен быть подсоединен к смартфону или другому мобильному устройству.

TSG - Технические характеристики

Технология передачи аудиосигналов: Цифровая.

Используемые звуки: Сигнал белого шума, который может быть создан в следующих конфигурациях:

Фильтр высоких частот	Фильтр низких частот
500 Гц	2000 Гц
750 Гц	3000 Гц
1000 Гц	4000 Гц
1500 Гц	5000 Гц
2000 Гц	6000 Гц
-	8000 Гц

Возможна амплитудная модуляция сигнала белого шума с глубиной затухания до 14 дБ.

Использование данного устройства согласно медицинским предписаниям

Модуль TSG должен использоваться строго в соответствии с предписаниями врача, аудиолога или специалиста-сурдолога. Во избежание необратимой потери слуха максимальное время ежедневного использования должно соответствовать уровню громкости генерируемого звука.

Для регулировки TSG, пожалуйста, обратитесь к специалисту-сурдологу.

В случае появления побочных эффектов в результате использования звукового генератора, например головокружения, тошноты, головных болей, субъективно воспринимаемого снижения функции органа слуха или усиления тиннитуса, необходимо прекратить использование звукового генератора и пройти медицинский осмотр

Целевая категория населения

Целевую категорию составляют взрослые в возрасте старше 18 лет. Кроме того, данное изделие можно использовать для детей в возрасте 12 лет и старше. Однако дети и лица с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития должны быть обучены процедуре размещения и извлечения слухового аппарата с модулем TSG. Обучение этой процедуре должен выполнять врач, аудиолог, специалист-сурдолог или опекун.

Важное примечание для будущих пользователей звукового генератора

Устройство для маскировки тиннитуса — это электронное устройство, предназначенное для генерирования шума, интенсивность и диапазон частот которого являются достаточными для того, чтобы замаскировать внутренние шумы. Данное устройство также используется для того, чтобы помогать пользователю слышать внешние шумы и речь.

Прежде чем использовать звуковой генератор, лица, страдающие тиннитусом, обязательно должны обратиться к сертифицированному врачу (желательно специализирующемуся на заболеваниях органа слуха), чтобы пройти медицинское обследование. К числу сертифицированных врачей, специализирующихся на заболеваниях органа слуха, относятся отоларингологи, отологи и оториноларингологи.

Цель медицинского обследования — удостовериться в том, что все излечимые заболевания, которые могут вызывать появление тиннитуса, выявлены и вылечены, прежде чем будет использоваться слуховой аппарат со звуковым генератором.

Звуковой генератор — это устройство, генерирующее звуки, которые используются в соответствии с надлежащими рекомендациями и/или в рамках программы борьбы с тиннитусом для облегчения состояния пациентов, страдающих тиннитусом.

Предупреждающая информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В случае ненадлежащего использования звуковые генераторы могут представлять опасность.

- Звуковые генераторы должны использоваться строго в соответствии с предписаниями врача, аудиолога или специалиста-сурдолога.

Звуковые генераторы — это не игрушка; их необходимо хранить вне досягаемости от всех (особенно детей и домашних животных), кто может нанести себе травму этими устройствами.

ВНИМАНИЕ:

- В случае появления побочных эффектов при использовании звукового генератора, например головокружения, тошноты, головных болей, субъективно воспринимаемого снижения функции органа слуха или усиления тиннитуса, необходимо прекратить использование звукового генератора и пройти медицинский осмотр.
- Прекратите использование звукового генератора и в кратчайшие сроки проконсультируйтесь с сертифицированным врачом, если у вас возникло одно из нижеперечисленных состояний:
 1. Видимая врожденная или возникшая в результате травмы деформация уха.
 2. Наличие в анамнезе данных об обильных выделениях из уха в течение предшествующих 90 дней.
 3. Наличие в анамнезе данных о внезапной или стремительной прогрессирующей потере слуха в течение предшествующих 90 дней.
 4. Острые или хронические приступы головокружения.
 5. Внезапная или недавняя односторонняя потеря слуха в течение предшествующих 90 дней.
 6. Костно-воздушный разрыв равен или превышает 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц.
 7. Видимые признаки значительного скопления ушной серы или наличия инородного тела в ушном канале.
 8. Боль или дискомфорт в ухе.
- Прекратите использование звукового генератора тиннитуса и в кратчайшие сроки проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом, если при использовании звукового генератора у вас наблюдаются субъективно воспринимаемые изменения интенсивности тиннитуса, дискомфорт или трудности при восприятии речи.
- Регулятор громкости — это функция модуля TSG, используемая для настройки уровня мощности звукового генератора. Во избежание использования звукового генератора в непредусмотренных целях пользователями детского возраста или с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития регулятор громкости (в случае, если он активирован) должен быть настроен только на уменьшение уровня мощности звукового генератора.
- Во время ношения слухового аппарата с TSG дети и лица с ограниченными физическими возможностями/нарушениями умственного развития должны находиться под присмотром опекуна.
- В случаях, когда пользователем является несовершеннолетнее лицо, изменение настроек звукового генератора тиннитуса посредством мобильного приложения должен выполнять только родитель или законный опекун.
- В случаях, когда пользователем является несовершеннолетнее лицо, использование ReSound Assist для дистанционной настройки звукового генератора тиннитуса должен осуществлять только родитель или законный опекун.



Предупреждение для специалистов-сурдологов касательно Tinnitus Sound Generator

Специалист-сурдолог должен рекомендовать будущему пользователю звукового генератора в кратчайшие сроки проконсультироваться с сертифицированным врачом (желательно специалистом по заболеваниям органов слуха) до начала использования звукового генератора, если в результате опроса, фактических наблюдений или получения любой другой информации о будущем пользователе он установит наличие у будущего пользователя любого из нижеперечисленных состояний:

1. Видимая врожденная или возникшая в результате травмы деформация уха.
2. Наличие в анамнезе данных об обильных выделениях из уха в течение предшествующих 90 дней.
3. Наличие в анамнезе данных о внезапной или стремительной прогрессирующей потере слуха в течение предшествующих 90 дней.
4. Острые или хронические приступы головокружения.
5. Внезапная или недавняя односторонняя потеря слуха в течение предшествующих 90 дней.
6. Костно-воздушный разрыв равен или превышает 15 дБ при 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц.
7. Видимые признаки значительного скопления ушной серы или наличия инородного тела в ушном канале.
8. Боль или дискомфорт в ухе.

⚠ ВНИМАНИЕ: Управлением по безопасности и гигиене труда установлено, что, работая на максимальной мощности, звуковой генератор может привести к снижению слуха. Согласно рекомендациям Национального института по охране и гигиене труда пользователь должен использовать звуковой генератор не более 8 (восемь) часов в день, если это устройство работает на уровне звукового давления от 85 дБ или выше. Если звуковой генератор работает на уровне звукового давления от 90 дБ и выше, пользователь должен использовать звуковой генератор не более 2 (двух) часов в день. Ни в коем случае нельзя использовать звуковой генератор на некомфортном уровне громкости.

Предупреждения общего характера и меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом:
 - Если вы подозреваете, что в вашем ушном канале есть инородное тело
 - Если у вас возникло раздражение на коже
 - Если при использовании слухового аппарата скапливается избыточное количество ушной серы
- См. также "Противопоказания", стр. 5
- Ни в коем случае не допускайте бесконтрольного использования слуховых аппаратов детьми или лицами с нарушениями умственного развития, когнитивных функций и психического здоровья. Слуховые аппараты содержат мелкие детали, которые могут представлять опасность в случае проглатывания.
- В случае проглатывания какой-либо детали слухового аппарата, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Не надевайте слуховые аппараты во время воздействия излучения. Некоторые виды излучения, например, в магнитно-резонансных и компьютерных томографах могут влиять на настройки слуховых аппаратов, что может вызвать сбой в их работе и повредить ваш слух.
- Другие виды излучения, например, в системах охранной сигнализации, системах видеонаблюдения, мобильных телефонах, металлоискателях и радиооборудовании не могут вызвать повреждение слуховых аппаратов. Однако они могут кратковременно повлиять на качество звука в слуховых аппаратах и вызвать появление нежелательных звуковых эффектов.
- Ни в коем случае не используйте слуховые аппараты в местах, где присутствуют взрывоопасные газы, например в шахтах, на объектах нефтедобычи и т. п., если только в этих местах не разрешено использовать слуховые аппараты. Использование слуховых аппаратов в местах, где это запрещено, может представлять опасность.
- Не пытайтесь просушить слуховые аппараты в печи, микроволновой печи или другом нагревательном оборудовании. Это приведет к расплавлению слуховых аппаратов, что может стать причиной получения ожогов.

- Внешние устройства, подключенные к электрическому входу, должны быть безопасными в соответствии с требованиями стандартов

Запрещается вносить какие-либо изменения в это устройство.

Предупреждения касательно мощных слуховых аппаратов

- Мощный слуховой аппарат может издавать очень громкий звук, чтобы компенсировать тяжелое или глубокое снижение слуха. Поэтому существует риск еще большего снижения оставшейся функции органов слуха.
- Ваши слуховые аппараты настроены на усиление тихих и громких звуков в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Если усиление кажется слишком громким, или вы подозреваете, что слуховой аппарат неисправен (например, вы слышите искаженные или необычные звуки), обратитесь к специалисту-сурдологу. Неисправный слуховой аппарат может повредить ваш слух.
- Как правило, громкие звуки могут оказывать отрицательное воздействие на остроту слуха. Это может быть громкая музыка или шумные места. Чтобы защитить свой слух, старайтесь реже подвергаться воздействию громких звуков или используйте средства для защиты органов слуха.
- Предупреждение для специалистов-сурдологов: Особую осторожность следует соблюдать при выборе и настройке слуховых аппаратов с максимальным уровнем звукового давления, превышающим 132 дБ и измеренным с использованием акустической камеры 2 куб. Существует риск еще большего снижения слуха.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Используйте слуховые аппараты согласно рекомендациям специалиста-сурдолога. Ненадлежащее использование может привести к повреждению слуха.
- Не используйте поврежденный или модифицированный слуховой аппарат. Он может функционировать ненадлежащим образом и, следовательно, ухудшить слух пользователя. У поврежденного слухового аппарата могут быть острые края, о которые пользователь может поцарапаться или порезаться.
- Используйте только изготавливаемые производителем оригинальные расходные материалы, например серные фильтры.
- Используйте только аксессуары, предназначенные для использования с вашими слуховыми аппаратами. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.
- Не пытайтесь изменить форму слухового аппарата или его аксессуаров. Это может вызвать кожные реакции и стать причиной образования острых краев, о которые пользователь может поцарапаться или пораниться.
- Если у вас два слуховых аппарата, они могут быть запрограммированы по-разному. Не меняйте их местами, так как это может повредить слух. Ваши слуховые аппараты отмечены цветовой маркировкой. Левый = синий. Правый = красный.

Если у ваших слуховых аппаратов нет цветовой маркировки, попросите специалиста-сурдолога нанести ее.

- Если вы подозреваете, что вкладыш, серный фильтр или другой предмет застрял у вас в ушном канале, обратитесь к специалисту-сурдологу. Эти предметы могут нанести вред и стать причиной возникновения инфекции в ухе.
- Если в месте соприкосновения слухового аппарата с ухом или головой есть рана или травма, дальнейшее использование слухового аппарата может привести к ухудшению ее состояния или препятствовать ее заживлению. Для получения помощи проконсультируйтесь со специалистом-сурдологом.

Ваши слуховые аппараты настроены в соответствии с вашим уровнем слуха. Не разрешайте другим

лицам использовать ваши слуховые аппараты, поскольку это может повредить их слух.

- Если активированы функции, работающие по беспроводной связи, слуховой аппарат передает маломощные сигналы с цифровой кодировкой, чтобы сообщаться с другими беспроводными устройствами. Это может влиять на другие электронные устройства, хотя такая вероятность исключительно мала. Если это происходит, отдалите слуховой аппарат от электронного устройства, на функционирование которого он влияет.
- В ситуациях, когда это необходимо, выключайте функцию беспроводной связи в слуховых аппаратах.

Для специалистов-сурдологов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сформировавшийся уровень звукового давления в ушах у детей может быть значительно выше, чем в среднем у взрослых. Рекомендуется измерить показатель RECD (разница между данными, измеренными в ухе человека и в акустической камере/куплере), чтобы добиться правильного целевого значения для настроенного OSPL90.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не выполняйте замену наружного корпуса или любых других деталей слухового аппарата, если только не обеспечена надлежащая защита от электростатических разрядов.

Предупреждения касательно кибербезопасности

Несоблюдение этих мер предосторожности может поставить под угрозу информационную безопасность вашего слухового аппарата и привести к потере слуха или возникновению тиннитуса.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Подключайте ваш слуховой аппарат только к проверенному компьютеру или мобильному устройству или компьютеру или мобильному устройству, которые используются специалистом-сурдологом.
- В течение 3 минут после включения слуховой аппарат остается доступным для установления связи. Не выполняйте перезагрузку слухового аппарата по просьбе лица, которому вы не доверяете, поскольку это может поставить под угрозу безопасность функционирования вашего устройства.
- Если ваше устройство неожиданно издает звук сопряжения, это может указывать на то, что кто-то получил доступ к вашему устройству.
- Всегда используйте новейшее программное обеспечение, доступное для вашего устройства.

Принимайте только запланированные звонки по предоставлению интерактивной помощи от специалиста-сурдолога.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
«Обратная связь» или свист	Правильно ли размещен ушной вкладыш или колпачок в ухе?	Повторно вставьте его.
	Звук слишком громкий?	Уменьшите громкость.
	Сломана трубка ресивера, или засорен ушной вкладыш?	Посетите специалиста-сурдолога.
	Вы держите какой-либо предмет (например, шапку или телефонную трубку) возле слухового аппарата?	Отодвиньте руку с этим предметом, чтобы между ним и слуховым аппаратом было больше места.
	В ухе скопилась ушная сера?	Посетите врача.
Отсутствует звук	Слуховой аппарат включен?	Включите его.
	Слуховой аппарат заряжен?	Зарядите слуховой аппарат. (См. руководство по использованию зарядного устройства.)
	Заряжено ли зарядное устройство для слуховых аппаратов?	Зарядите зарядное устройство для слуховых аппаратов. (См. руководство по использованию зарядного устройства.)
	Сломана трубка ресивера, или засорен ушной вкладыш?	Посетите специалиста-сурдолога.
	В ухе скопилась ушная сера?	Посетите врача.
Батарейка очень быстро разряжается.	Вы оставляли слуховой аппарат включенным на длительное время?	Всегда выключайте слуховые аппараты, когда не используете их, или установите слуховые аппараты в зарядное устройство для зарядки. Батарейки разряжаются быстрее, если используются функции, работающие по беспроводной связи, например потоковая передача аудиоданных с мобильного устройства или телевизора посредством нашего ТВ-стримера.
	Вы используете слуховые аппараты 3–4 года?	Посетите специалиста-сурдолога.
Слуховой аппарат не заряжается	Слуховой аппарат правильно размещен в зарядном устройстве?	Повторно разместите слуховой аппарат в зарядном устройстве.(См. руководство по использованию зарядного устройства.)
	Зарядное устройство для слуховых аппаратов заряжено или подключено к источнику питания?	Зарядите зарядное устройство для слуховых аппаратов. (См. руководство по использованию зарядного устройства.)

Гарантийные обязательства и ремонт

На свои слуховые аппараты компания-производитель предоставляет гарантию на случай дефектов изготовления или материалов, как описано в соответствующей гарантийной документации. В рамках своей политики сервисного обслуживания компания-производитель обязуется обеспечивать функциональность своих слуховых аппаратов, по меньшей мере, на ее исходном уровне.

Бесплатное гарантийное обслуживание слуховых аппаратов ReSound осуществляется в течение 12 месяцев со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати (торгующей организации) в руководстве пользователя и гарантийном талоне;
- предъявлении беспроводного аксессуара в чистом виде.

В случае отсутствия даты продажи гарантийные обязательства вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые аппараты:

- с механическими повреждениями,
- носящие следы химического воздействия,
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве пользователя.

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Гарантийный период слуховых аппаратов указан на гарантийном талоне, который выдается специалистом-сурдологом.

Гарантийный срок хранения СА 2 года с момента изготовления.

Неисправные слуховые аппараты должны быть отремонтированы квалифицированным техническим специалистом. Не пытайтесь открыть корпус слуховых аппаратов, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.

В случае отсутствия даты продажи гарантийные обязательства вступают в силу с даты проверки.

Гарантийное обслуживание слуховых аппаратов ReSound осуществляет:

Общество с ограниченной ответственностью «Джи-Эн Хиринг РУС» 125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1

+7 (495) 697-30-10, +79175601981

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Условия эксплуатации:

от + 5 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха 15 – 90%, без образования конденсата, но без требования относительно парциального давления водяного пара выше 50 гПа. Допустимым является атмосферное давление в диапазоне 700 гПа и 1060 гПа.

Условия хранения: Температура воздуха От -20 °С до +60 °С Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата Не более 90% Атмосферное давление от 500 гПа до 1100 гПа

Условия транспортирования: Температура воздуха От -20 °С до +60 °С Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата Не более 90% Атмосферное давление От 500 гПа до 1100 гПа

Приблизительный срок службы

Приблизительный срок службы изделия при использовании по назначению составляет:

Устройство	Срок службы
Слуховой аппарат	5 лет
Встроенный аккумулятор	5 лет
Вкладыш	3 месяца
Ресиверы	2 года
Электронные аксессуары, например, беспроводные аксессуары	5 лет

Изделия соответствуют следующим нормативным требованиям:

EN/IEC 60601-1-2 (ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014)	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
EN ISO 10993-5 (ГОСТ ISO 10993-5-2023)	Изделия медицинские электрические. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
EN ISO 10993-10 (ГОСТ ISO 10993-10-2023)	Изделия медицинские электрические. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
IEC 60118-13 ГОСТ IEC 60118-13-2022	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Совместимость. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств
ГОСТ Р МЭК 62304-2022	Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла
ГОСТ Р 50444-2020	«Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 51024-2012	Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022	«Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»;
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	«Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014.	Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность
ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003	Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-12-2023	«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Отбор и подготовка образцов для проведения исследований»
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности


Описание Аппарата слухового заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, модели RU960-DRWC, RU760-DRWC, RU560-DRWC, RU460-DRWC и принадлежностей

Обозначения типов


Обозначения типа моделей слуховых аппаратов, описанных в данном руководстве пользователя: CARR1, идентификационный код FCC: X26CARR1, IC: 6941C-CARR1.

Номинальная передаваемая радиочастотная мощность на выходе составляет -4,5 дБм. Данное устройство передает и принимает радиочастотные сигналы в частотном диапазоне от 2,4 ГГц до 2,48 ГГц, слуховые аппараты оснащены радиоустройством, работающим по принципу магнитной индукции на частоте 10,66 МГц. Сила магнитного поля, генерируемого этим радиоустройством составляет: Макс. -24 дБмкА/м на расстоянии 10 м.


Схематическое изображение

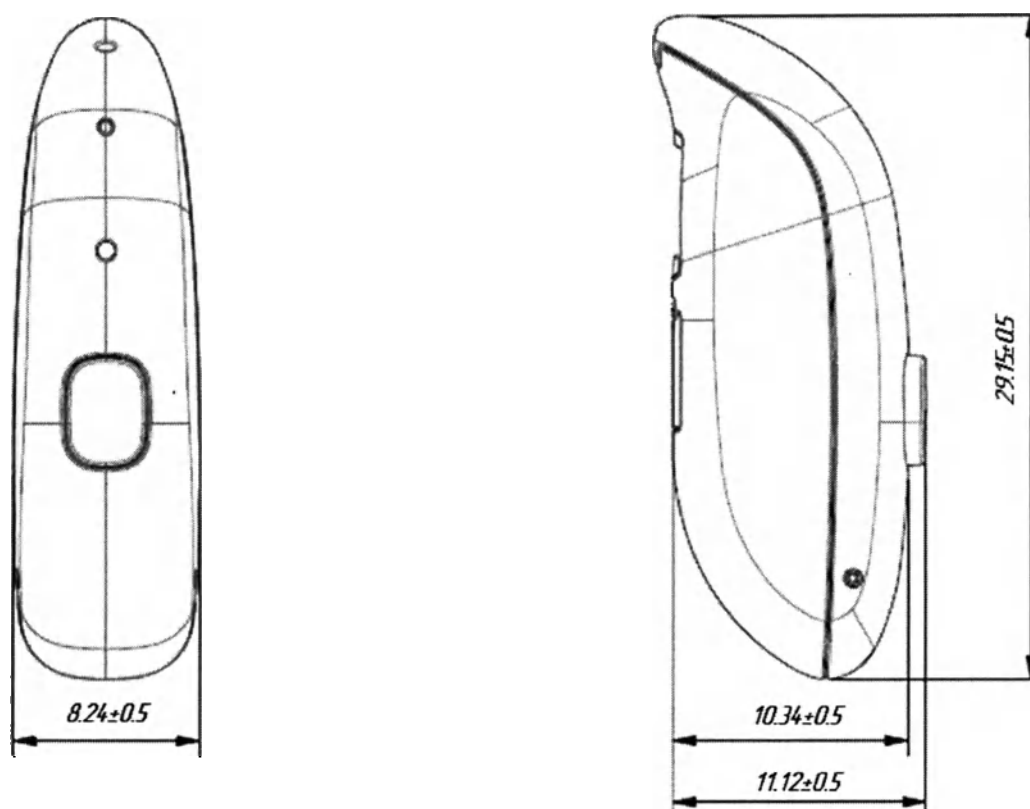

Масса: 2,23 ±0,2 г.

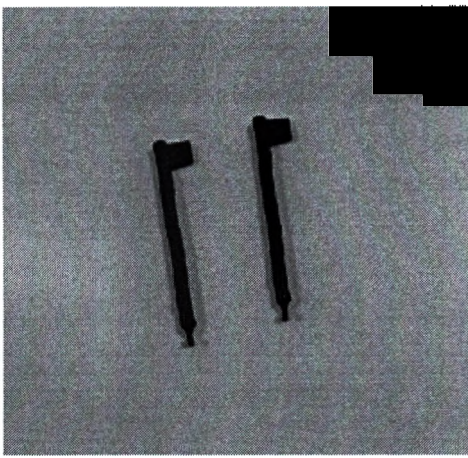Внешний вид	Описание
Программное обеспечение ReSound Smart Fit 	Версия ПО: 1.16 (подробная информация см. раздел 10) Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (57х18х11) ±0,5 мм. Масса: 16 ±0,2 г.
Цветной маркер красный Цветной маркер синий 	Служат для индикации правого и левого слуховых аппаратов. Установка маркеров осуществляется однократно в авторизованном сервисном центре и/или специалистом по слухопротезированию. Замена маркеров не предусмотрена, но, при необходимости, может быть выполнена в авторизованном сервисном центре. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (27,2х4,7х1,9) ±0,5 мм. Масса: 0,09 ±0,2 г.

Фильтр серный

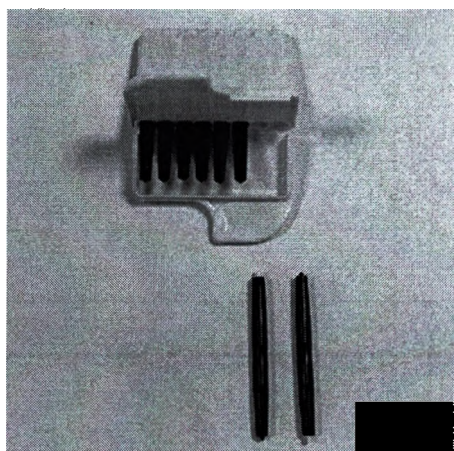

Устанавливается в ресивер для защиты ресивера от серы.

Габаритные размеры: ДхШхВ, мм:

Кейс: $(52,5 \times 36,5 \times 5,5) \pm 0,5$ мм.



Масса: $7 \pm 0,2$ г.

Фильтр на палочке для установки:

$(39,5 \times 3,2 \times 3,2) \pm 0,5$ мм

Масса: $0,38 \pm 0,2$ г.

**Ресивер SF3 для слухового
аппарата правый/левый, тип LP**

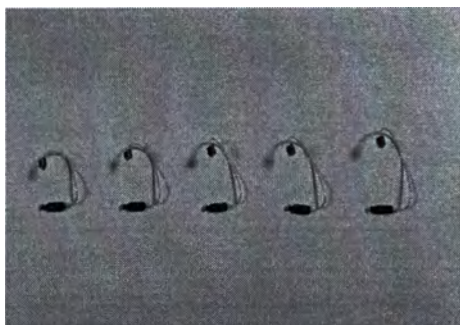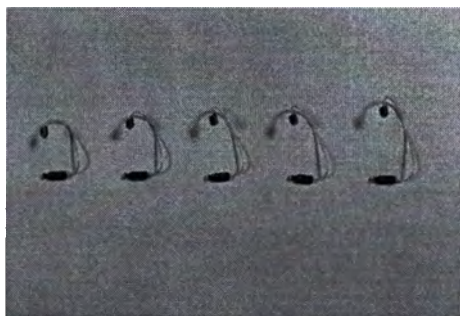

Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Размер 0: ДхШхӨ, мм:(27,0 x 18,0 x 3,0)±0,5 мм.

Масса: 0,23±0,02 г.

Размер 1: ДхШхӨ, мм:(30,0 x 18,0 x 3,0) ±0,5 мм

Масса: 0,23±0,02 г.

Размер 2: ДхШхӨ, мм:(33,0 x 18,0 x 3,0)±0,5 мм

Масса: 0,23±0,02 г.



Размер 3: ДхШхӨ, мм:(35,0 x 18,0 x 3,0) ±0,5 мм.

Масса: 0,24 ±0,02 г.

Размер 4: ДхШхӨ, мм: 37,0 x 18,0 x 3,0 ±0,5 мм.

Масса: 0,24 ±0,02 г.

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип МР

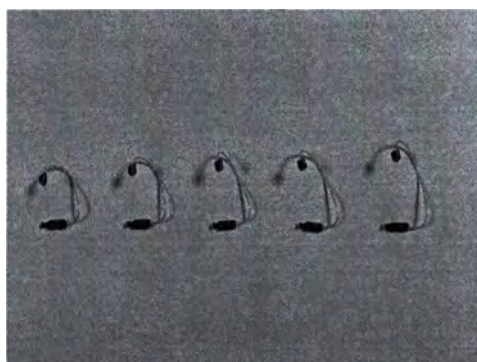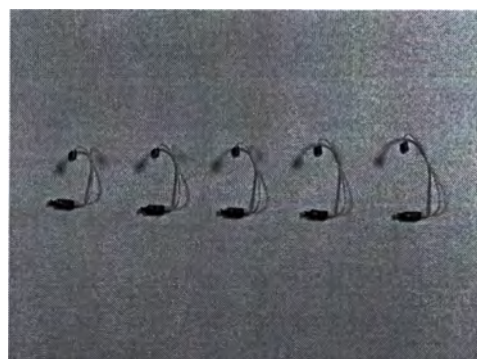

Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Размер 0: ДхШхӨ, мм: (27,0 x 18,0 x 3,0)±0,5 мм.

Масса: 0,30±0,02 г.

Размер 1: ДхШхӨ, мм: (30,0 x 18,0 x 3,0)±0,5 мм.

Масса: 0,30±0,02 г.

Размер 2: ДхШхӨ, мм: (33,0 x 18,0 x 3,0)±0,5 мм.

Масса: 0,30±0,02 г.



Размер 3: ДхШхӨ, мм: (35,0 x 18,0 x 3,0)±0,5 мм.

Масса: 0,31 ±0,02 г.

Размер 4: ДхШхӨ, мм: (37,0 x 18,0 x 3,0) ±0,5 мм.

Масса: 0,31 ±0,02 г.

Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип НР

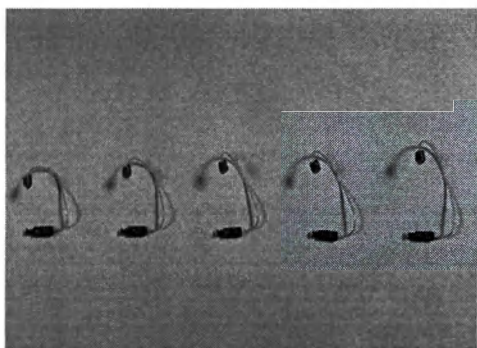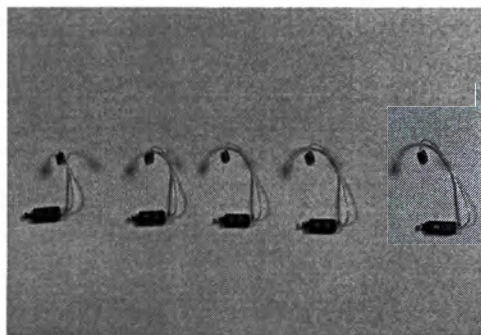

Элемент слухового аппарата, кото-рый преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо.

Размер 0: ДхШхӨ, мм: (27,0 x 18,0 x 3,0) $\pm$ 0,5 мм.

Масса: 0,53 $\pm$ 0,02 г.

Размер 1: ДхШхӨ, мм: (30,0 x 18,0 x 3,0) $\pm$ 0,5 мм.

Масса: 0,53 $\pm$ 0,02 г.



Размер 2: ДхШхӨ, мм: (31,0 x 18,0 x 3,0) $\pm$ 0,5 мм.




Масса: 0,53 $\pm$ 0,02 г.

Размер 3: ДхШхӨ, мм: (35,0 x 18,0 x 3,0) $\pm$ 0,5 мм.


Масса: 0,55 $\pm$ 0,02 г.

Размер 4: ДхШхӨ, мм: 38,0 x 18,0 x 3,0 $\pm$ 0,5 мм. Масса: 0,55 $\pm$ 0,02 г.

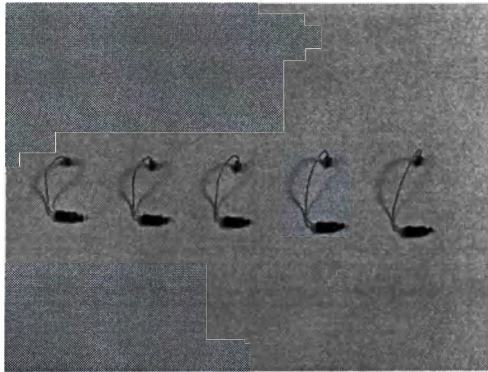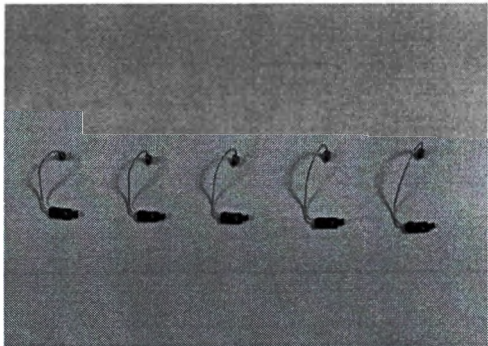Ресивер SF3 для слухового аппарата правый/левый, тип M&RIE  	Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Размер 0: ДхШхӨ, мм: (29,6 x 19,5 x 3,0) $\pm$0,5 мм. Масса: 0,35$\pm$0,02 г. Размер 1: ДхШхӨ, мм: (31,6 x 19,5 x 3,0) $\pm$0,5 мм. Масса: 0,37$\pm$0,02 г. Размер 2: ДхШхӨ, мм: (33,6 x 19,5 x 3,0) $\pm$0,5 мм. Масса: 0,37$\pm$0,02 г. Размер 3: ДхШхӨ, мм: (35,6 x 19,5 x 3,0) $\pm$0,5 мм. Масса: 0,37$\pm$0,02 г. Размер 4: ДхШхӨ, мм: (37,6 x 19,5 x 3,0) $\pm$0,5 мм. Масса: 0,37$\pm$0,02 г.
Ресивер SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP 	Элемент слухового аппарата, который преобразует электрический сигнал в звуковой и передает в ухо. Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (10 x 6 x 4) $\pm$0,2 мм Масса: 0,60 $\pm$0,02 г

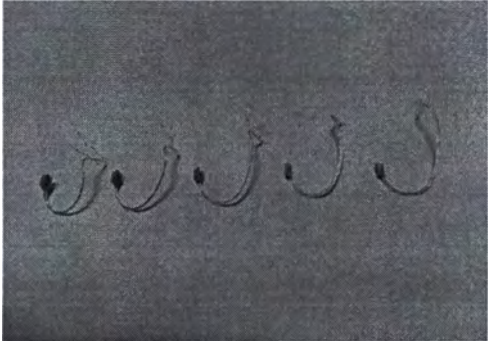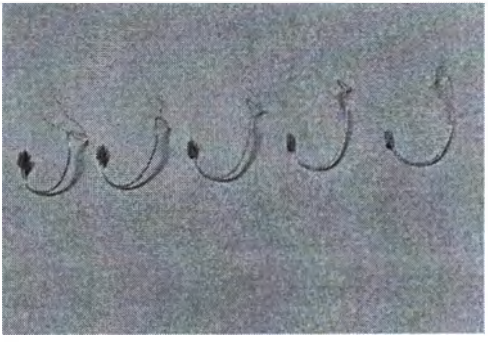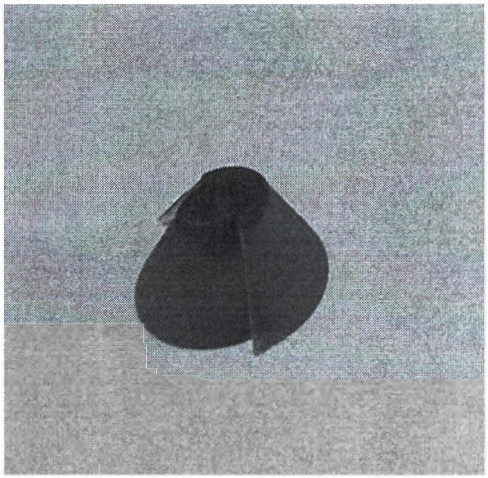Звукопровод для ресивера SF для слухового аппарата правый/левый, тип UP  	Предназначен для соединения с ресивером тип UP Размер 0: ДхШхВ, мм: (14,9 x 17,5 x 0,8) $\pm 0,5$ мм Масса: 0,06$\pm$0,02 г Размер 1: ДхШхВ, мм: (17,1 x 19,31 x 0,8) $\pm 0,5$ мм Масса: 0,06$\pm$0,02 г Размер 2: ДхШхВ, мм: (17,3 x 23,14 x 0,8) $\pm 0,5$ мм Масса: 0,06$\pm$0,02 г Размер 3: ДхШхВ, мм: (20,1 x 27,69 x 0,8) $\pm 0,5$ мм Масса: 0,06$\pm$0,02 г Размер 4: ДхШхВ, мм: (20,1 x 31,02 x 0,8) $\pm 0,5$ мм Масса: 0,07$\pm$0,02 г
Вкладыш SF3 тюльпан 	Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате. Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале. Высота: 8 $\pm$0,2 мм. Диаметр: 12,5 $\pm$0,2 мм. Масса: 0,12$\pm$0,02 г.

Вкладыш SF3 мощный

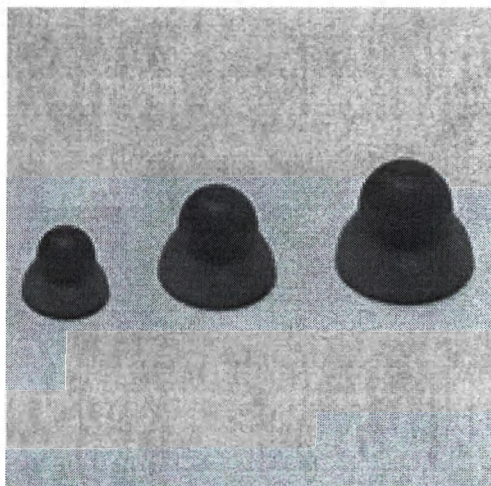

Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате.

Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале.

Размер малый:

Высота: $7,6 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $5,6 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,09 \pm 0,02$ г.

Размер средний:

Высота: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,16 \pm 0,02$ г.


Размер большой:

Высота: $11,5 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $11,5 \pm 0,02$ мм.

Масса: $0,20 \pm 0,02$ г.

Вкладыш SF3 открытый

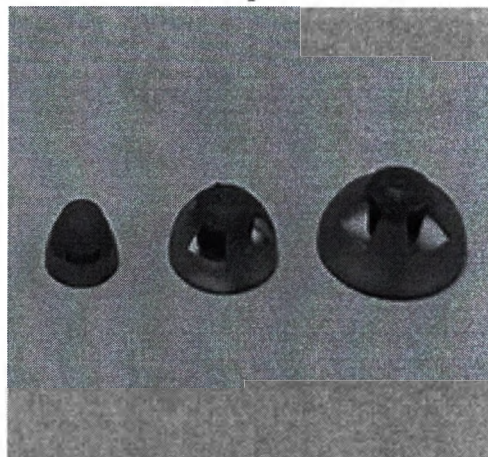

Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате.

Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале.

Размер малый:

Высота: $4,3 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $5,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,1 \pm 0,02$ г.

Размер средний:

Высота: $5,1 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $7,6 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,07 \pm 0,02$ г.


Размер большой:

Высота: $6,5 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,04 \pm 0,02$ г.

Вкладыш SF3 закрытый

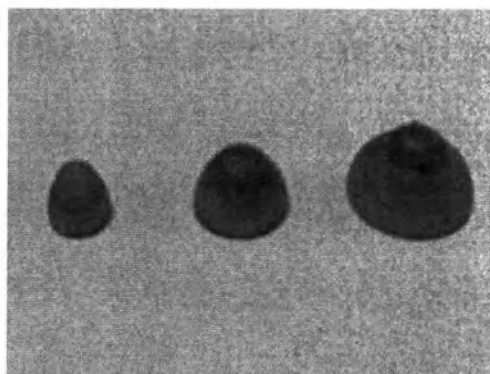

Вкладыш предназначен для подсоединения к тонкой трубочке ресивера в слуховом аппарате.

Вкладыш необходим для размещения выходного звукового отверстия слухового аппарата в ушном канале.

Размер малый:

Высота: $4,3 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $5,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,05 \pm 0,02$ г.

Размер средний:

Высота: $5,1 \pm 0,2$ мм.

Диаметр: $7,6 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,07 \pm 0,02$ г.


Размер большой:

Высота: $6,5 \pm 0,2$ мм.


Диаметр: $10,0 \pm 0,2$ мм.

Масса: $0,12 \pm 0,02$ г.

Набор серных фильтров для микрофона в ресивере M&RIE	Размер кейса: ДхШхВ, мм: $(52,5 \times 36,5 \times 5,5) \pm 0,5$ мм Масса: $7 \pm 0,2$ г Фильтр на палочке: Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: $(39,5 \times 3,2 \times 3,2) \pm 0,5$ мм Масса: $0,38 \pm 0,2$ г
Футляр пластиковый 	Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: $(94 \times 62 \times 27) \pm 0,5$ мм. Масса: 55 ± 2 г.

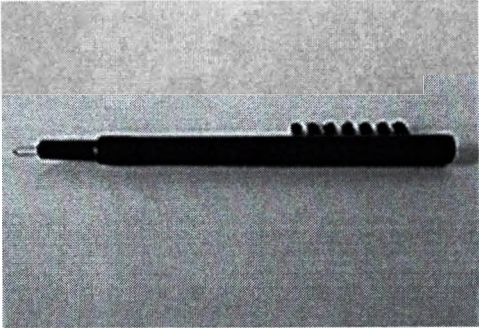Набор для очистки: салфетка, щетка Салфетка:  Щетка: 	Габаритные размеры ДхШхВ, мм: Салфетка: $(150 \times 150 \times 0,3) \pm 0,5$ мм. Масса: $3 \pm 0,2$ г Щетка: $(62 \times 4 \times 8) \pm 0,5$ мм. Масса $0,78 \pm 0,2$ г.
--	---

Упаковка для аппарата слухового
заушного с ресивером в ухе
ReSound серии OMNIA с
принадлежностями

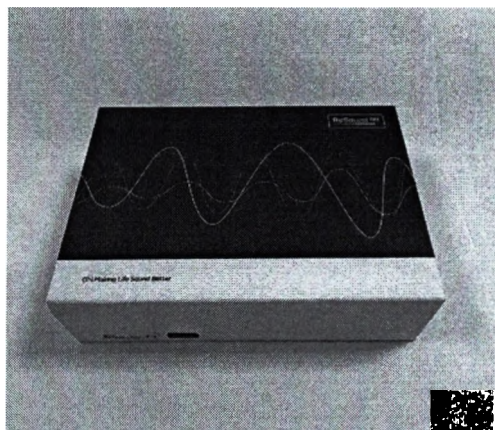

Габаритные размеры ДхШхВ, мм:


$(165 \times 117 \times 45) \pm 5$ мм

Масса: 81 ± 2 г.

Слуховой аппарат с ресивером в ухе (RIE) — Ресивер LP/MP

Модели: RU960-DRWC, RU760-DRWC, RU560-DRWC, RU460-DRWC (технические характеристики)

		LP		MP
Контрольное усиление (50 дБ УЗД на входе) (2 версии: кривые на слуховом аппарате и контрольном усилителе)	УЗН	32	37	дБ
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) (2 версии: кривые на слухе, показывающий полное и контрольное тестовое усиление)	Макс.	63	66	дБ
	УЗН	46	52	
Максимальная мощность (50 дБ УЗД на входе)	Макс.	113	116	дБ УЗД
	УЗН	106	114	
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц	0,5	0,6	%
	800 Гц	0,2	0,5	
	1600 Гц	0,4	0,7	
Эквивалентный уровень шума без шумоподавления Эквивалентный уровень шума со спектром 1/3 октавы, без шумоподавления	1000 Гц	20	20	дБ УЗД
		7	7	
Частотный диапазон IEC 60118-0: 2015		100-9410	100-9100	Гц
Срок службы батареи (на батарейках — перезаряжаемых)*		24	24	часов

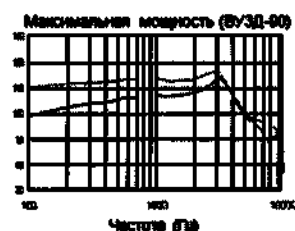


Измерено в соответствии с ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, LIS C 5512: 2015, камера 2 куб. см.

*Приблизительное время функционирования аккумуляторной батарейки зависит от задействованных функций, использования беспроводных аксессуаров, степени снижения слуха, срока службы батарейки и звукового окружения

Слуховой аппарат с ресивером в ухе (RIE) — Ресивер HP/UP

Модели: RU960-DRWC, RU760-DRWC, RU560-DRWC, RU460-DRWC

		HP		UP
Контрольное усиление (90 дБ УЗД на входе) (2 верные кривые на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	УВЧ	40	47	дБ
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе) (2 верные кривые на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	Макс. УВЧ	65 59	75 65	дБ
Максимальная мощность (90 дБ УЗД на входе)	Макс. УВЧ	122 117	130 124	дБ УЗД
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц	0,3	1,0	%
	800 Гц	0,7	1,3	
	1600 Гц	0,7	0,1	
Эквивалентный уровень шума без шумоподавления	1600 Гц	20	22	дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума со спектром 1/3 октавы, без шумоподавления		7	9	
Частотный диапазон IEC 60118-0: 2015		100-7140	100-5010	Гц
Срок службы батареек (тип батареек — перезаряжаемые)*		24	24	часов

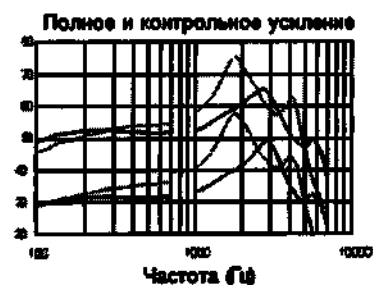

Измерено в соответствии с ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, JIS C 5512: 2015, камера 2 куб. см.

*Приблизительное время функционирования аккумуляторной батарейки зависит от задействованных функций, использования беспроводных аксессуаров, степени снижения слуха, срока службы батареек и звукового окружения

Слуховой аппарат с ресивером в ухе (RIE) — Ресивер MM

Модели: RU960-DRWC, RU760-DRWC, RU560-DRWC, RU460-DRWC

MM			
Контрольное усиление (90 дБ УЗД на входе) (Нижняя кривая на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	УВЧ	33	дБ
Полное усиление (90 дБ УЗД на входе) (Верхняя кривая на схеме, показывающей полное и контрольное тестовое усиление)	Макс. УВЧ	53 47	дБ
Максимальная мощность (90 дБ УЗД на входе)	Макс. УВЧ	115 110	дБ УЗД
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц	0,1	%
	800 Гц	0,9	
	1600 Гц	0,4	
Эквивалентный уровень шума без шумоподавления	1600 Гц	20	дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума со спектром 1/3 октавы, без шумоподавления		7	
Частотный диапазон IEC 60118-0: 2015		100-9100	Гц
Срок службы батареек (тип батареек — перезаряжаемая)*		24	часов



Измерено в соответствии с ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015, JIS C 5512: 2015, камера 2 куб. см.

*Приблизительное время функционирования аккумуляторной батарейки зависит от задействованных функций, использования беспроводных аксессуаров, степени снижения слуха, срока службы батарейки и звукового окружения

И **ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, а также может создавать вредные помехи для средств радиосвязи, в случае если установка и использование данного оборудования не осуществляется в соответствии с надлежащими инструкциями.

Однако невозможно гарантировать то, что помехи не возникнут в определенной установке. Если данное оборудование все-таки создает вредные помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- измените положение приемной антенны или переставьте ее;
- увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
- подключите оборудование к розетке или сети, отличной от сети, к которой подключен приемник.
- для получения помощи проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радио-/телеоборудованию.

Портативные и мобильные радиочастотные средства могут воздействовать на медицинское изделие.

Медицинское изделие не следует применять в непосредственной близости другого оборудования или во взаимосвязи с ним.

Внесение изменений или модификаций может лишить пользователя права эксплуатировать данное оборудование

Декларация производителя по электромагнитной совместимости

Применение принадлежностей, кабелей, иных, нежели указаны в данной инструкции по применению, за исключением приобретенных у производителя в качестве запасных частей, может привести к увеличению помех или снижению защищенности аппарата.

Электромагнитные излучения помех

Аппарат предназначен для использования при электромагнитных условиях, приведенных ниже. Заказчик и/или пользователь аппарата должен обеспечить нижеуказанные электромагнитные условия.

Таблица 1

Измерение излучения	соответствие	Электромагнитная совместимость
"адиочастотное излучение согласно CISPR 11	Группа 1	Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования
Радиочастотное излучение согласно CISPR 11	Класс В	Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.
Излучение гармоник согласно ГОСТ IEC 61000-3-2	Не применяют	
Колебания напряжения согласно ГОСТ IEC 61000-3-3	Не применяют	

Электромагнитная помехоустойчивость

Аппарат слуховой костной проводимости предназначен для использования при электромагнитных условиях, приведенных ниже. Заказчик и/или Пользователь аппарата должен обеспечить нижеуказанные электромагнитные условия

Таблица 6

Тест невосприимчивости	Тестовое значение по ГОСТ МЭК 60601-1-2	соответствие	Электромагнитная обстановка-рекомендации
Электростатический разряд ГОСТ МЭК 61000-4-2	+/-6 кВ контактный заряд +/-8 кВ разряд воздуха	+/-6 кВ +/-8 кВ	Полы должны быть деревянными или из керамической плитки. Если полы покрыты синтетическими материалами, относительная влажность должна быть не менее 30%
Величина магнитного поля частоты 50/60 Гц по ГОСТ МЭК 61000- 4-8	3 А/м	3 А/м	Сила магнитных полей должна быть на уровне, типичном для коммерческого и/или медицинского применения.

Таблица 2

Тест невосп ри имчив ости	Тестовое значение по ГОСТ МЭК 60601-1-2	Соотв етст вие	Электромагнитная обстановка-рекомендации
Излучен ные высокочас тотные помехи ГОСТ МЭК 61000-4-3	3В/м от 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В/м	Портативные и мобильные средства коммуникации, в том числе кабели, не должны использоваться ближе к любой части аппарата, чем рекомендованное удаление, рассчитанное из уравнения частоты излучателя Напряженность поля от фиксированных источников, как указано в отчете об электромагнитной совместимости , должно быть меньше уровня соответствия в каждом частотном диапазоне. Вблизи оборудования, обозначенного следующим символом, может наблюдаться интерференция 

Примечание 1. При 80 МГц и 800 МГц выбирается более высокая частота.

Примечание 2. Данные рекомендации могут выполняться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от окружающих предметов и людей.

Напряженность поля от фиксированных излучателей, например, радиоприемников, телефонов

(сотовых, беспроводных), мобильных и любительских радиоприемников, АМ, FM и TV приемников не может быть теоретически предсказана с высокой точностью. Для оценки электромагнитной среды с учетом фиксированных радиочастотных передатчиков следует учесть необходимость проведения электромагнитных изысканий на объекте. Если измеренная напряженность поля на участке, где используется аппарат, превышает допустимые уровни радиочастотного излучения, приведенные выше, то необходимо следить за его работой, чтобы обеспечить его нормальное функционирование. В случае ненормального функционирования возможна необходимость принятия дополнительных мер, таких как переориентация или перемещение прибора аппарата.

Рекомендованно удаление портативных и мобильных средств коммуникации от аппарата в соответствии с нормами ГОСТ МЭК 60601-1-2.

Аппарат предназначен для использования при электромагнитных условиях, при которых излучаемые радиочастотные помехи контролируются. Заказчик или пользователь может помочь предотвратить электромагнитные помехи, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и аппаратом как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.

Таблица 3

Частота излучателя	От 150 кГц до 80 МГц	От 150 кГц до 800 МГц	От 150 кГц до 2,5 ГГц
Номинальная выходная мощность излучателя, Вт	Безопасное расстояние, м	Безопасное расстояние, м	Безопасное расстояние, м
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

Примечание: 1. При 80 МГц и 800 МГц удаление выбирается исходя из более высокой частоты.

Примечание 2. Данные рекомендации могут выполняться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение и отражение от окружающих предметов и людей.

Дополнительная информация

Все аппараты слуховые заушные с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями настраиваются в центрах протезирования или сервисных центрах, специалистом индивидуально в соответствии с потребностями клиента.

Для настройки аппаратов слуховых заушных с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями используется программное обеспечение ReSound Smart Fit (класс безопасности В).

Данное программное обеспечение для настройки, Resound Smart Fit, должно устанавливаться и использоваться только специалистами по слуху. Рекомендуется всегда обновлять программное обеспечение для настройки до последней.

Для настройки аппаратов слуховых заушных с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA, с принадлежностями используется стандартный интерфейсный адаптер для программирования слухового аппарата (программатор): HI-PRO, NOAHlink, AIRLINK2, Noahlink Wireless, Speedlink

Интерфейсный адаптер для программирования слухового аппарата (программатор): HI-PRO, AIRLINK2 и др. и программное обеспечение не являются принадлежностями и поставляются отдельно в центры протезирования или сервисные центры.

Необходимыми требованиями для установки программного обеспечения являются:

ТРЕБОВАНИЯ К ПК	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК
Процессор	Процессор Intel Core i3 или аналогичный	Процессор Intel Core i7 или аналогичный
ОЗУ	4 ГБ	8 ГБ
Свободное место на жестком диске	8 ГБ	10 ГБ
Разрешение экрана	Полный экран - 1280 x 1024 Широкоформатный экран - 1366 x 768	Полный экран - 1400 x 1050 Широкоформатный экран - 1920 x 1080
Операционные системы	Windows 7 - 32bit/*64bit (SP1 или выше)	Windows 10 - 64-bit
Noah	4.12.1	4 .12 .1 (или выше)
Интернет-браузеры	Internet Explorer (IE) - версия 11 (или выше) Google Chrome - версии 41 и 42 (или выше) Firefox - версии 39 и 40 (или выше) Safari - версия 7 (или выше) <i>Мобильный браузер не поддерживается.</i>	
Порты	Порт USB 2 .0 (или выше)	
Приводы	DVD-ROM	
Звуковая карта	16-бит, стерео, совместимая с Microsoft DirectSound и DirectSound 3D	
Наружное оборудование	Принтер, *камера и *микрофон	

Некоторые части данного программного обеспечения написаны Кеннетом Маккеем (micro-ess) и лицензированы согласно следующим положениям и условиям:

Авторское право © Кеннет Маккей, 2014. Все права защищены.

Повторное распространение и использование в исходной и двоичной форме, при наличии или отсутствии модификаций, разрешено в случае соблюдения следующих условий:

- Повторное распространение исходного кода должно осуществляться с сохранением вышеуказанного уведомления об авторском праве, данного перечня условий и нижеприведенного заявления об ограничении ответственности.
- При повторном распространении в двоичной форме вышеуказанное уведомление об авторском праве, данный перечень условий и нижеприведенное заявление об ограничении ответственности должны быть изложены в документации и/или других материалах, которые прилагаются к распространяемым копиям.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ, И ОНИ НЕ НЕСУТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ И СОИСПОЛНИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОТЕРЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ПЕРЕРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН И ОСНОВАНИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА, ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЛЕДСТВИЕ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ В СИЛУ ДРУГИХ ПРИЧИН), ВОЗНИКАЮЩИХ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

📌 ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие значка Made for Apple означает, что аксессуар специально предназначен для установления связи с устройствами iPhone, iPad и iPod touch, а также сертифицирован компанией-разработчиком в соответствии с эксплуатационными стандартами компании Apple.

Компания Apple не несет ответственность за эксплуатацию данного устройства или его соответствие нормативам и стандартам безопасности.

© 2023 GN Hearing A/S. Все права защищены. ReSound является товарным знаком GN Hearing A/S.

Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google LLC. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Свидетельство о приемке и продаже

Слуховые аппараты ReSound [RODUCT NAME] и ReSound [RODUCT NAME] сертифицированы.

Слуховой аппарат _____

Серийный № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____ м.п.

Изготовитель:

Джи-Эн РиСаунд

А/С Лаутрупбьорг, 7

DK2750 Баллеруп

Дания

**Корешок талона № 1
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации

м.п

**ТАЛОН № 1 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

**Корешок талона № 2
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации

м.п

**ТАЛОН № 2 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Корешок талона № 2

на гарантийное обслуживание СА eSound в течение 12 месяцев

**Серийный № _____ Дата проверки _ Изъят _____ Представитель ремонтной
_____ организации ____ м.п.**

ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание

СА ReSound течение 12 месяцев Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп Дата продажи _

**Представитель ремонтной
организации _____ м.п.**

**Корешок талона № 3
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации

м.п

**ТАЛОН № 3 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

**Корешок талона № 4
на гарантийное обслуживание СА
ReSound в течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____

Изъят _____

Представитель ремонтной организации

м.п

**ТАЛОН № 4 на гарантийное
обслуживание
СА ReSound течение 12 месяцев**

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

Производство согласно
Регламенту ЕС 2017/745 о медицинских
изделиях:

Производитель:
Международный главный офис
GN ReSound A/S
(«Джи-Эн РиСаунд А/С»),
Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup Denmark (Дания)
Регистрационный номер 55082715

Уполномоченный представитель производителя:
Россия
ООО «Джи-Эн Хиринг РУС»
125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., дом 7, стр.1, пом.1
Тел.: +7 495 697 30 10,
+7 495 697 66 00



Перевод

Печать: /ГЕРБ/ Нотариус 2. Копенгаген/
Штамп: /НОТАРИУС/

/логотип Джи-Эн РиСаунд/

«УТВЕРЖДЕНО»

Ген. дир. Джи-Эн Хиринг А/С (GN Hearing A/S)

(должность)

Аксель Маркус Питер Карлстрёммер
(Axel Marcus Peter Karlströmer)
(ФИО)

Штамп: /Джи-Эн РиСаунд
Лаутрупбьерг 7,
ДК-2750, Баллеруп
Дания

/подпись/
(подпись)

Рег. №: 55082715/
(штамп)

«__» _____ 23-09-2024

Фин. дир. Джи-Эн Хиринг А/С (GN Hearing A/S)

(должность)

Съёрен Йелерт (Søren Jelert)
(ФИО)

Штамп: /Джи-Эн РиСаунд
Лаутрупбьерг 7,
ДК-2750, Баллеруп
Дания

/подпись/
(подпись)

Рег. №: 55082715/
(штамп)

«__» _____ 23-09-2024

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ К МЕДИЦИНСКОМУ ИЗДЕЛИЮ

Аппарат слуховой заушный с ресивером в ухе ReSound серии OMNIA с принадлежностями

Версия: 02
Год: 2024

Джи-Эн РиСаунд А/С | Лаутрупбьерг 7 | ДК-2750, Баллеруп | Дания | +45 45 75 11 11
Рег. № 55082715 | info@gnresound.com | www.resound.com

Печать: /Копенгагенский окружной суд | ГЕРБ | Суды Дании/

Я, нижеподписавшийся, **Н.Е. Кристенсен**, нотариус г. Копенгаген, Дания, настоящим заверяю, что

Г-н Аксель Маркус Питер Карлстрёммер
и
Г-н Съёрен Йелерт

которые подтвердили мне свои личности, предъявив паспорта, подписали настоящий документ. Настоящее заверение осуществляется на основании образцов подписей, предоставленных в нотариальную контору.

Кроме того, я подтверждаю, что на основании записей Датского управления по делам предпринимательства с 24 сентября 2024 г-н Аксель Маркус Питер Карлстрёммер и г-н Съёрен Йелерт являются лицами, уполномоченными подписывать документы от лица публичной компании с ограниченной ответственностью

Джи-Эн ХИРИНГ А/С
и
Джи-Эн РиСаунд А/С,

действуя совместно.

Я не просматривал, не одобрял и не отклонял содержание подписанного документа.

Никаких явных изменений и дополнений в документе, кроме тех, что подписаны (завизированы) мной, нет.

В подтверждении чего я ставлю свою подпись и нотариальную печать.

Городской суд Копенгагена, Отделение нотариальных дел, 25 сентября 2024

/подпись/

Н.Е. Кристенсен
Нотариус г. Копенгаген, Дания

Печать: /ГЕРБ| Нотариус г. Копенгаген/

/далее текст на русском языке/

Перевод с английского и датского языков на русский язык сделан мной, Стекольниковой Ириной Вячеславовной

Стекольниковой Ириной Вячеславовной

Российская Федерация
Город Москва

Одиннадцатого октября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Панфилова Елена Викторовна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Стекольниковой Ирины Вячеславовны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/432-н/77-2024-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.В. Панфилова
Е.В. Панфилова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью сто пятьдесят
три листов.

Нотариус _____