
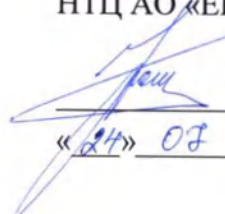


УТВЕРЖДАЮ

Директор проектного офиса
НТЦ АО «ЕПЗ»


Крошкин М.В.
«24» 07 2024

Руководства по эксплуатации медицинского изделия
«Ширмы медицинские по ГИКС.942810.113 ТУ»

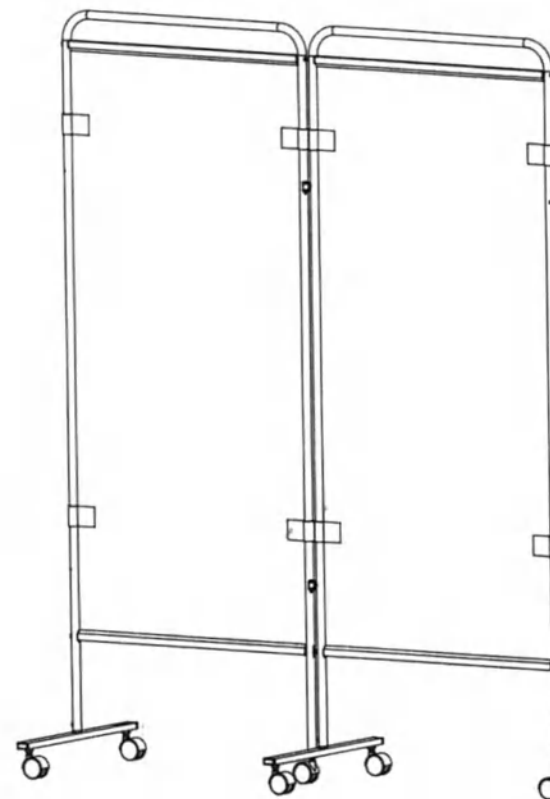

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.1)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.110РЭ**

Ширма медицинская (мод.1) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности: Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на ширму.

! Изменение угла соединения секций производить с ОСТОРОЖНОСТЬЮ во избежание травм.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 13,5±1,3 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (1530x530x1878) ± 10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на шесть колёсных опор, снабженных стопором, не регулируемых по высоте.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на колёсных опорах не превышает 15 Н.

2.4 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 15 Н.

2.5 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.6 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.7 Каркас ширмы изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены две секции, соединенные между собой ввертными петлями. Рама каждой секции установлена на три нерегулируемые по высоте колесные опоры, снабженные стопором. Полотно закреплено на две поперечины с дополнительным креплением к раме контактной лентой. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.1)	1 компл., в составе:
– Рама левая с полотном	1 шт.
– Рама правая с полотном	1 шт.
– Опора	2 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Опора колёсная	6 шт.
– Петля ввёртная М8	2 шт.
– Винт М6х12	2 шт.

– Штифт петли	2 шт.
– Гайка М8	4 шт.
– Шайба 8	4 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 602101, Владимирская область, г. Меленки, ул. Железнодорожная, д.3, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.1) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код _____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

*Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25*




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpi@elamed.com

Сайт компании: lpi.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

 **ЕЛАМЕД**

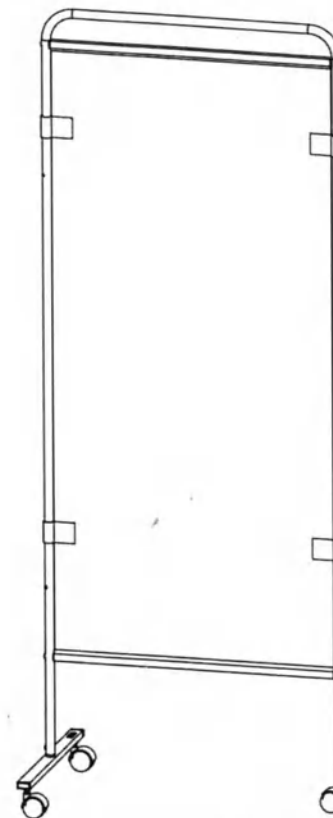

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.2)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.110-01РЭ**

Ширма медицинская (мод.2) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на ширму.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 6,8±0,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (800х530х1878) ± 10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на три колёсные опоры, снабженные стопором, не регулируемые по высоте.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на колёсных опорах не превышает 15 Н.

2.4 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 15 Н.

2.5 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.6 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.7 Каркас ширмы изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрена одна секция. Рама установлена на три нерегулируемые по высоте колёсные опоры, снабженные стопором. Полотно закреплено на две поперечины с дополнительным креплением к раме контактной лентой. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.2)	1 компл., в составе:
– Рама с полотном	1 шт.
– Опора	1 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Опора колёсная	3 шт.
– Винт М6х12	1 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 602101, Владимирская область, г. Меленки, ул. Железнодорожная, д.3, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.2) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

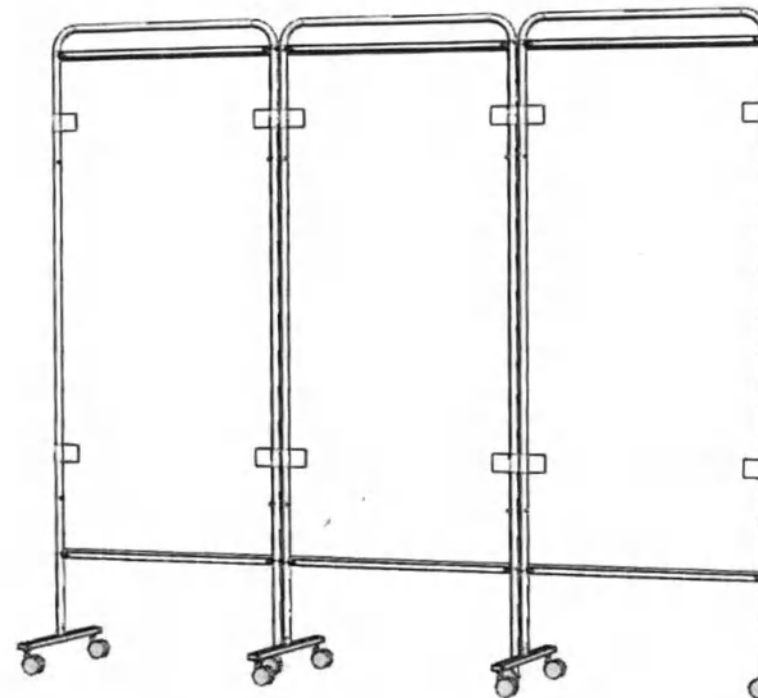

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.3)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.110-02РЭ**

Ширма медицинская (мод.3) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Противопоказания: не имеет.

Побочные действия: не выявлены.

Меры предосторожности: Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на ширму.

! Изменение угла соединения секций производить с ОСТОРОЖНОСТЬЮ во избежание травм.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 20,3±2,0 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (2240x530x1878) ± 10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на девять колёсных опор, снабженных стопором, не регулируемых по высоте.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на колёсных опорах не превышает 15 Н.

2.4 Усилие, необходимое для включения стопора колёс не более 15 Н.

2.5 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – не более 3 мм.

2.6 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.7 Каркас ширмы изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены три секции, соединенные между собой ввертными петлями. Рама каждой секции установлена на три колесные опоры, снабженные стопором. Полотно закреплено на две поперечины с дополнительным креплением к раме контактной лентой. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.3)	1 компл., в составе:
– Рама левая с плотном	1 шт.
– Рама средняя с полотном	1 шт.
– Рама правая с полотном	1 шт.
– Опора	3 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Опора колёсная	9 шт.
– Петля ввёртная М8	4 шт.

– Гайка М8	8 шт.
– Шайба 8	8 шт.
– Винт М6х12	3 шт.
– Штифт петли	4 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 602101, Владимирская область, г. Меленки, ул. Железнодорожная, д.3, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотно ширмы

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.3) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

*Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25*




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpi@elamed.com

Сайт компании: lpi.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

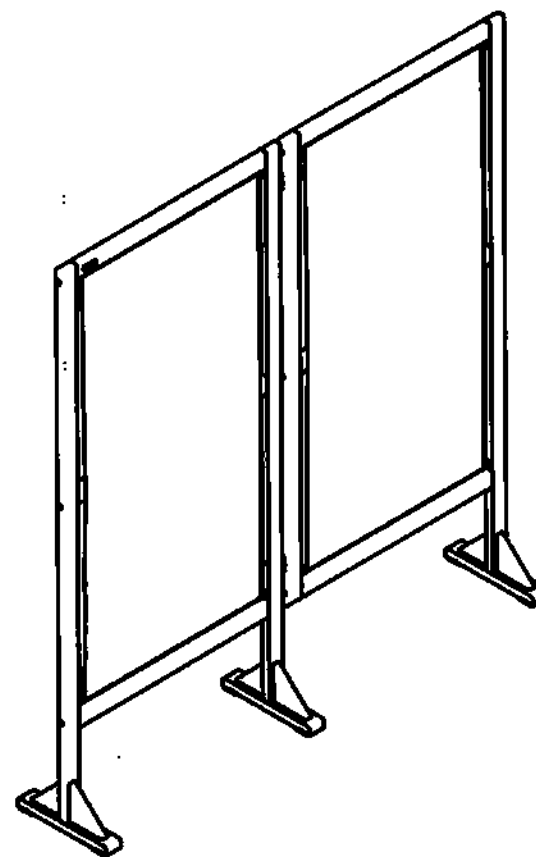

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.4)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.127РЭ**

Ширма медицинская (мод.4) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться на ширму.

! Изменение угла соединения секций производить с ОСТОРОЖНОСТЬЮ во избежание травм.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: $7,1 \pm 0,5$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(1530 \times 300 \times 1656) \pm 10\%$.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на три не регулируемые по высоте ножки с двенадцатью мебельными подпятниками.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на ножках не превышает 40 Н.

2.4 Зазор между одной из опор в виде бруска и горизонтальной плоскостью пола – не более 5 мм.

2.5 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$; номинальное значение относительной влажности 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

2.6 Каркас ширмы изготовлен из бруса хвойных пород с лакокрасочным покрытием. Ширма установлена на три нерегулируемые по высоте ножки с двенадцатью мебельными подпятниками. В конструкции предусмотрены две секции, соединенные между собой ввертными петлями. Полотно в каждой секции крепится на верхнюю и нижнюю перекладины. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.4)	1 компл., в составе:
– Планка вертикальная 1	2 шт.
– Планка горизонтальная	6 шт.
– Опора	3 шт.
– Подпорка	6 шт.
– Перекладина	4 шт.
– Полотно	2 шт.
– Планка вертикальная 2 (с отверстием под петлю)	1 шт.
– Планка вертикальная 3 (короткая под петлю)	1 шт.
– Подпятник мебельный	12 шт.
– Гвоздь	24 шт.
– Саморез	21 шт.
– Шкант	30 шт.
– Заглушка	12 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Петля ввертная (нижняя часть)	2 шт.
– Петля ввертная (верхняя часть)	2 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 шт.
- Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха до 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Ленина, д.68, АО «Елатомский приборный завод».

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.4) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Сайт компании: ipu.elamed.com



Регистрационное удостоверение № РЗН

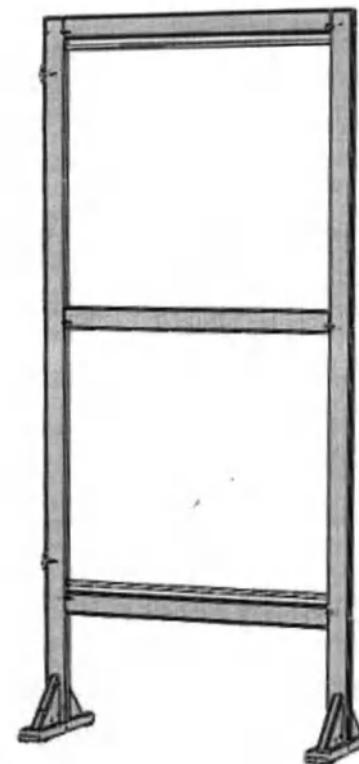

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.5)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.127-01РЭ**

Ширма медицинская (мод.5) (в дальнейшем - ширма предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности: Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться на ширму.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 3,7±0,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (750х300х1656) ± 10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на две ножки с восьмью мебельными подпятниками, не регулируемые по высоте.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на ножках не превышает 40 Н.

2.4 Зазор между одной из опор в виде бруска и горизонтальной плоскостью пола – не более 5 мм.

2.5 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.6 Каркас ширмы изготовлен из бруса хвойных пород с лакокрасочным покрытием. Ширма установлена на две нерегулируемые по высоте ножки с восьмью мебельными подпятниками. В конструкции предусмотрена одна секция. Полотно крепится на верхнюю и нижнюю перекладины. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.5)	1 компл., в составе:
– Планка вертикальная	2 шт.
– Планка горизонтальная	3 шт.
– Опора	2 шт.
– Подпорка	4 шт.
– Перекладина	2 шт.
– Полотно	1 шт.
– Подпятник мебельный	8 шт.
– Гвоздь	16 шт.
– Саморез 5x50	12 шт.
– Шкант 10x60	18 шт.
– Заглушка	6 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Ленина, д.68, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхность ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использо-

ОМ №29.1298.01 от 24.04.2024 г.
валясь ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов
класса «А».

11. Сертификат о приемке

Ширма медицинская (мод.5) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями
ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код _____

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елампский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25




Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЭЛАМЕД

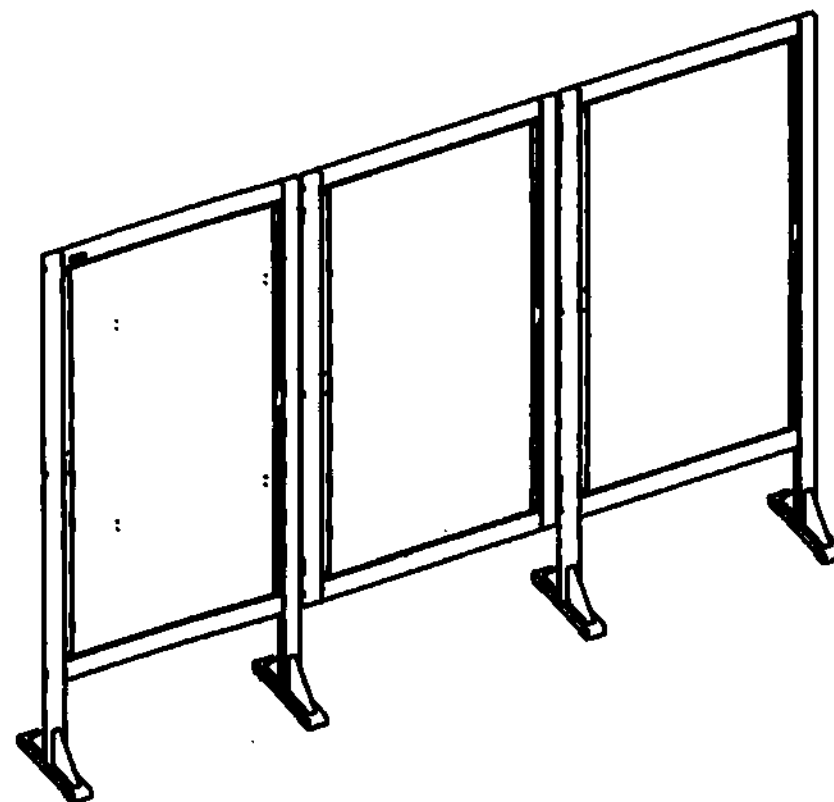

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.113ТУ

Ширма медицинская (мод.6)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.127-02РЗ**

Ширма медицинская (мод.6) (в дальнейшем - ширма), предназначена для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для создания перегородки в процедурных, смотровых кабинетах с целью скрытия пациента во время медицинских процедур, направленных на лечение и диагностику заболеваний, реабилитацию и мониторинг состояния организма пациента.

Область применения: для оснащения лечебных и лечебно-профилактических организаций.

Побочные действия: не выявлены.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности: Ненадлежащее использование ширмы может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части ширмы не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация ширмы проводится в медицинских перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться на ширму.

! Изменение угла соединения секций производить с ОСТОРОЖНОСТЬЮ во избежание травм.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 10,4±0,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (2315x300x1656) ± 10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы ширмы – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления ширмы.

2.2 Ширма установлена на четыре ножки с шестнадцатью мебельными подпятниками, не регулируемые по высоте.

2.3 Усилие, необходимое для передвижения ширмы на ножках не превышает 40 Н.

2.4 Зазор между одной из опор в виде бруска и горизонтальной плоскостью пола – не более 5 мм.

2.5 Ширмы при эксплуатации соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.6 Каркас ширмы изготовлен из бруса хвойных пород с лакокрасочным покрытием.

Ширма установлена на четыре нерегулируемые по высоте ножки с шестнадцатью мебельными подпятниками. В конструкции предусмотрены три секции, соединенные между собой ввёртными петлями. Полотно в каждой секции крепится на верхнюю и нижнюю перекладины. Ширма поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество
Ширма медицинская (мод.6)	1 компл., в составе:
– Планка вертикальная 1	2 шт.
– Планка горизонтальная	9 шт.
– Опора	4 шт.
– Подпорка	8 шт.
– Перекладина	6 шт.
– Полотно	3 шт.
– Планка вертикальная 2 (с отверстием под петлю)	2 шт.
– Планка вертикальная 3 (короткая под петлю)	2 шт.
– Подпятник мебельный	16 шт.
– Гвоздь	36 шт.
– Саморез	30 шт.
– Шкант	30 шт.
– Заглушка	18 шт.
– Логотип компании	1 шт.
– Петля ввертная (нижняя часть)	4 шт.
– Петля ввертная (верхняя часть)	4 шт.
– Руководство по эксплуатации	1 шт.
– Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Ширма транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Ширма транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения ширмы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности ширмы устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Ленина, д.68, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. После хранения ширмы или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10 °C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2. Сборка ширмы производится согласно инструкции по сборке.

6.2. Ограничения в процессе эксплуатации ширмы.

Во избежание преждевременного выхода из строя ширмы не допускается подвергать поверхности ширмы воздействию предметов, вызывающих появление царапин или порезов на полотне ширмы.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ширмы требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ширмы включает в себя:

- визуальный осмотр всей конструкции ширмы не реже одного раза в месяц;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей ширмы путём протирания влажной ветошью, с последующей протиркой насухо во избежание появления разводов и пятен;
- дезинфекцию поверхностей ширмы путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещена ширма.

9. Ремонт

Ремонт ширмы включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность ширмы.

10. Утилизация

Ширма, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась ширма по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Ширма медицинская (мод.6) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.113ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25



Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

КОПИЯ
ВЕРНА

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 19 листа(ов).

Директор проектного офиса АО «ЕПЗ»

Крошкин М.В.


25 07 2024



УТВЕРЖДАЮ

Директор проектного офиса

НТЦ АО «ЕПЗ»

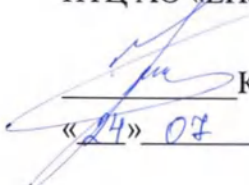
Крошкин М.В.

«24» 07 2024

Инструкции по сборке медицинского изделия

«Ширмы медицинские по ГИКС.942810.113 ТУ»

Инструкция по сборке изделия
Ширмы медицинские ГИКС. 94.2810.113ТУ
Ширма медицинская (мод.1)

Документация:

1. Руководство по эксплуатации.
2. Инструкция по сборке.


Упаковка:

Транспортная упаковка.

Условные обозначения:

1. А-Е : детали
2. 1 - 4 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 2 : этапы сборки

Код товара

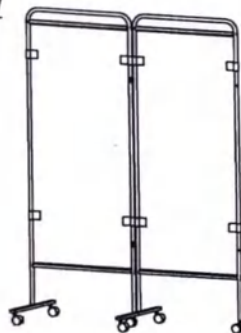
**Детали**

№	Наименование	Кол - во
А	Рама левая с полотном	1
Б	Рама правая с полотном	1
В	Опора	2
Г	Логотип компании	1
Д	Опора колёсная	6
Е	Петля ввёртная М8	2

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	2	Винт М6х12	
2	2	Штифт петли	
3	4	Гайка М8	
4	4	Шайба 8	


Изображения крепежа и фурнитуры показаны условно
и могут отличаться от поставляемых в комплекте

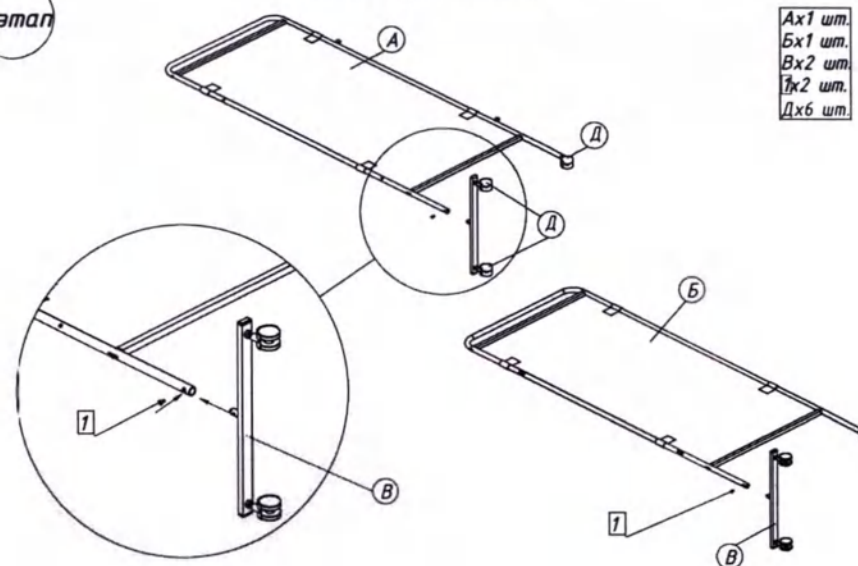Схема сборки изделия**1 этап**

Ах1 шт.
Бх1 шт.
Вх2 шт.
Гх2 шт.
Дх6 шт.

2 этап

Штифты 2 забить
лёгкими ударами
молотка

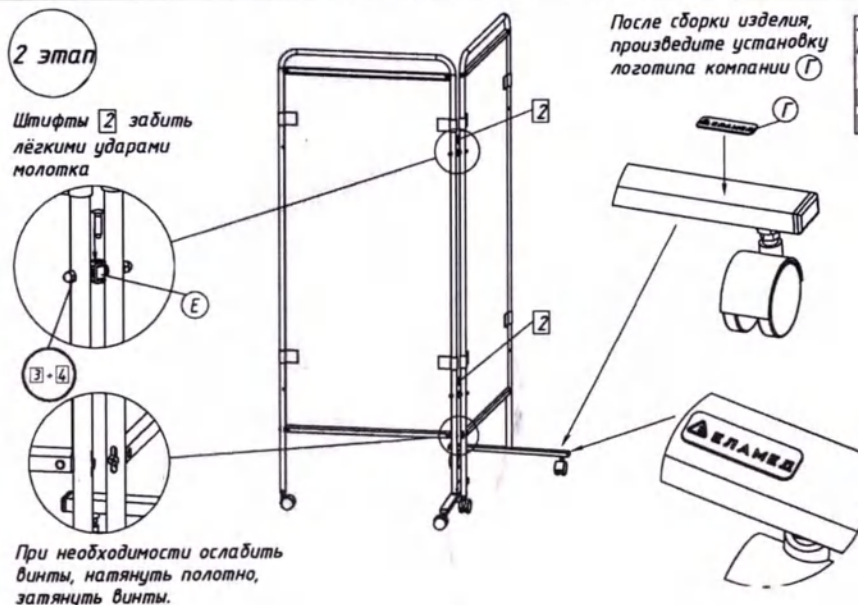


После сборки изделия,
произведите установку
логотипа компании Г

2х2 шт.
Гх1 шт.
Ех2 шт.
Зх4 шт.
Их4 шт.

При необходимости ослабить
винты, натянуть полотно,
затянуть винты.

Инструкция по сборке изделия
Ширмы медицинские ГИКС.942810.113ТУ
Ширма медицинская (мод.2)

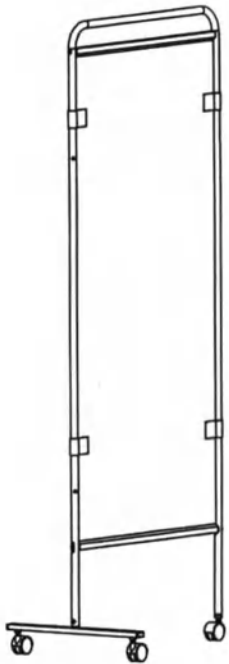

Документация:

- 1. Руководство по эксплуатации.
- 2. Инструкция по сборке.

Упаковка:

Транспортная упаковка.

Условные обозначения:

- 1. А-Д : детали
- 2. 1 : крепёж и фурнитура
- 3. 1- 2 : этапы сборки

Код товара

Детали


№	Наименование	Кол - во
А	Рама с полотном	1
Б	Опора	1
В	Логотип компании	1
Д	Опора колёсная	3

Изображения крепежа и фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в комплекте

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	1	Винт М6х12	

Схема сборки изделия

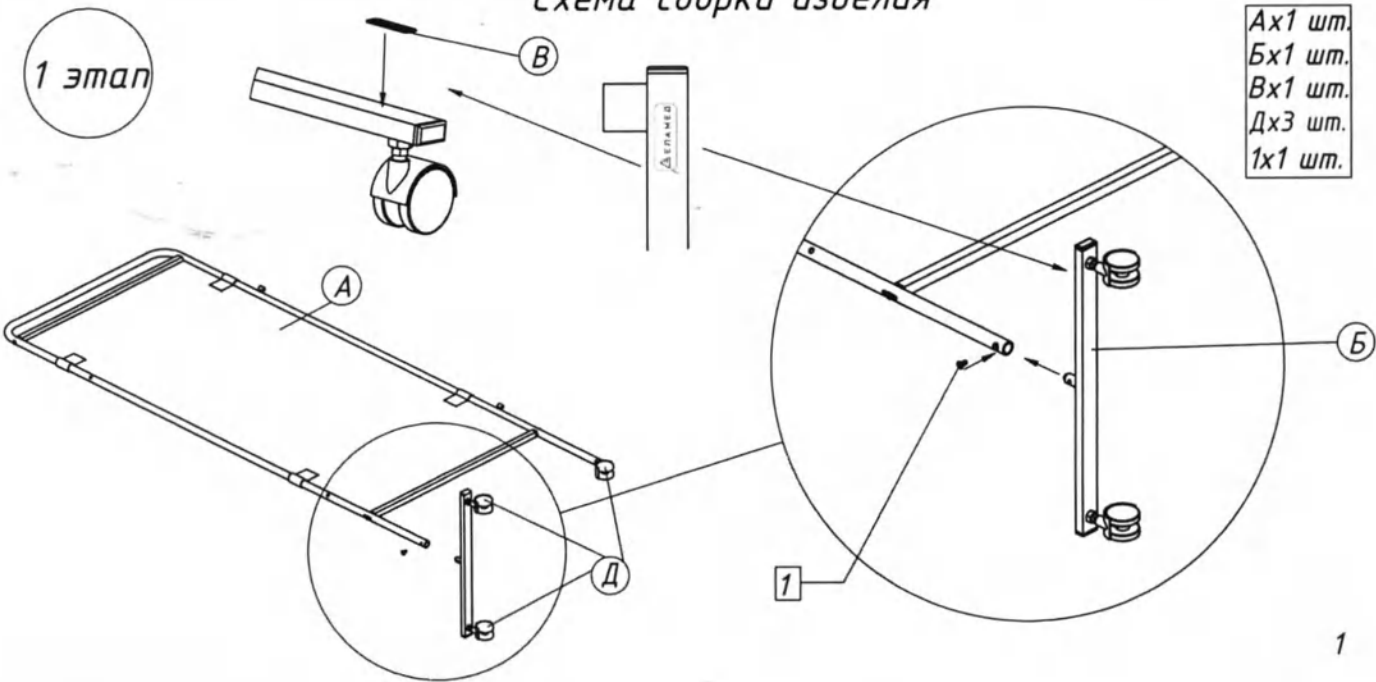

Инструкция по сборке изделия
Ширмы медицинские ГИКС 942810 113ТУ
Ширма медицинская (мод.3)

Документация:


1. Руководство по эксплуатации.
2. Инструкция по сборке.

Упаковка:

Транспортная упаковка.

Условные обозначения:

1. А-В : детали
 2. 1-2 : крепёж и фурнитура
 3. 1-2 : этапы сборки
- Код товара

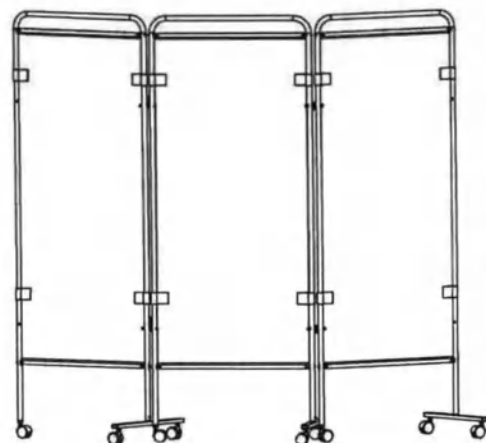

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Рама левая с полотном	1
Б	Рама средняя с полотном	1
В	Рама правая с полотном	1
Г	Опора	3
Д	Логотип компании	1
Е	Опора колёсная	9
Ж	Петля ввёртная М8	4
З	Гайка М8	8
И	Шайба 8	8

Изображения крепежа и фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в комплекте

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	3	Винт М6х12	
2	4	Штифт петли	

Схема сборки изделия



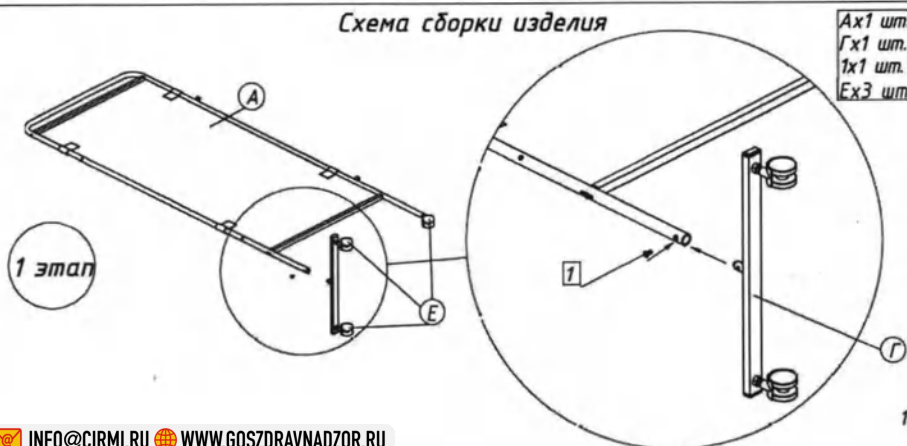


Схема сборки изделия

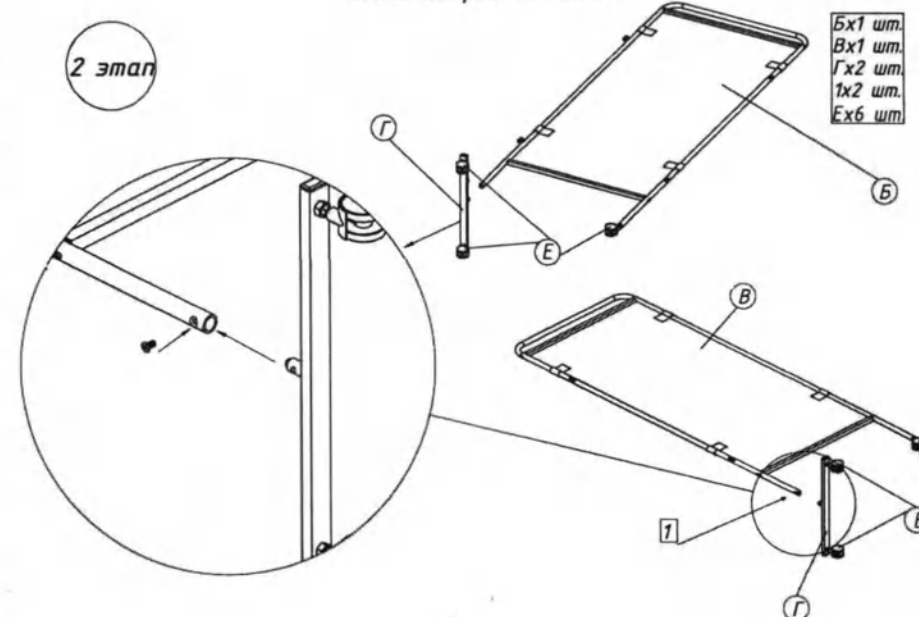


3 этап

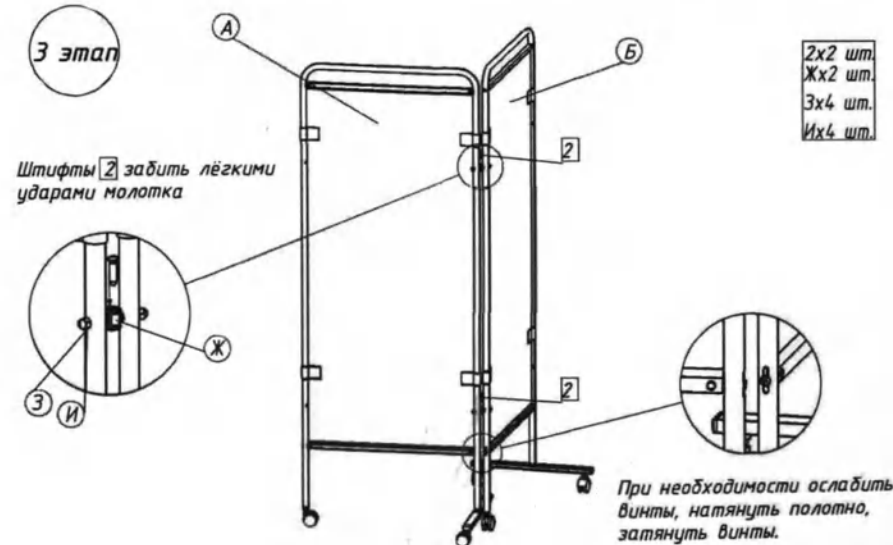

4 этап

Повторить 3 этап
с противоположной стороны
рамы Б

Схема сборки изделия

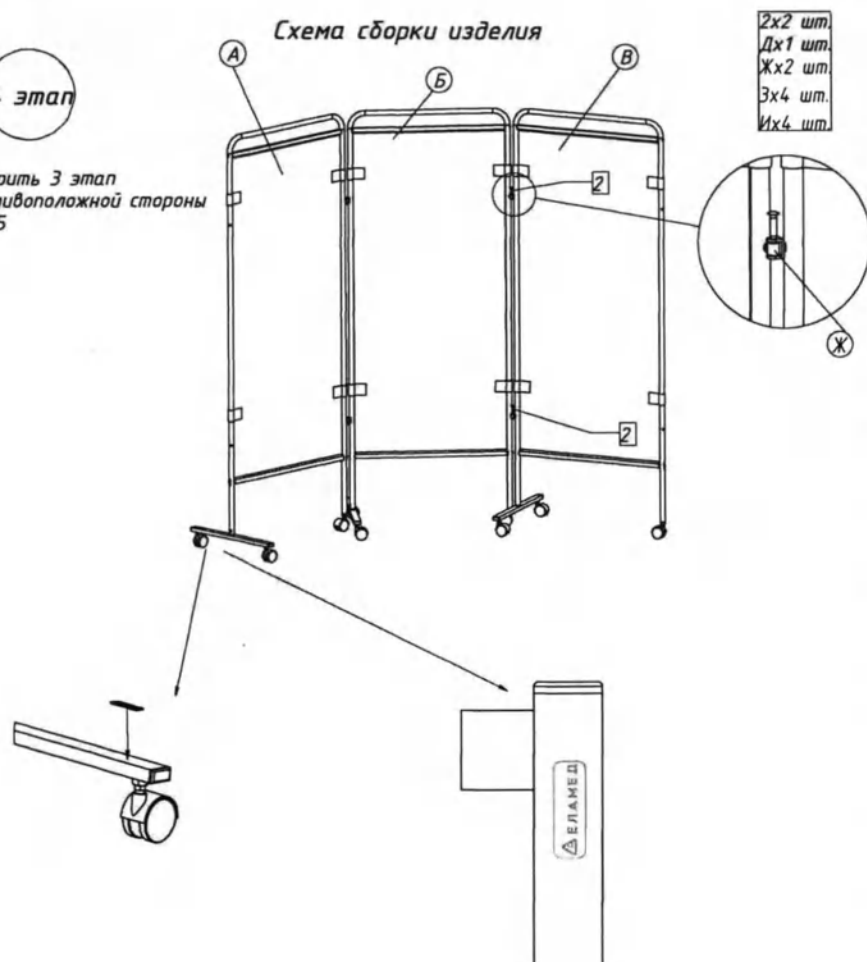


Инструкция по сборке изделия
Ширмы медицинские ГИКС.942810.113ТУ
Ширма медицинская (мод.4)

Условные обозначения:

- 1 А-И: детали
 2 [1] - [8]: крепеж и фурнитура
 3 [1] - [10]: этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Планка вертикальная 1	2
Б	Планка горизонтальная	6
В	Опора	3
Г	Подпорка	6
Д	Перекладина	4
Е	Полотно	2
Ж	Планка вертикальная 2 (с отверстием под петлю)	1
И	Планка вертикальная 3 (короткая под петлю)	1

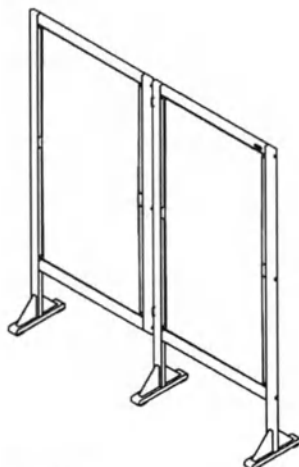

Крепеж и фурнитура

Обозн.	Кол-во	Обозначение	Рисунок
[1]	12	Подпятник мебельный	
[2]	24	Гвоздь	
[3]	21	Саморез	
[4]	30	Шкант	
[5]	12	Заглушка	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	2	Петля ввертная (нижняя часть)	
[8]	2	Петля ввертая (верхняя часть)	

Изображения крепежа и фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в комплекте

1


Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку опоры

Рекомендации по сборке:

- разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона от упаковки и на них производите сборку изделия
- закрепите гвоздями [2] подпятники мебельные [1] (расстояние от края опоры до подпятника 10 мм);
- установите шканты [4] (выступление шкантов за нижнюю плоскость опоры не допускается)

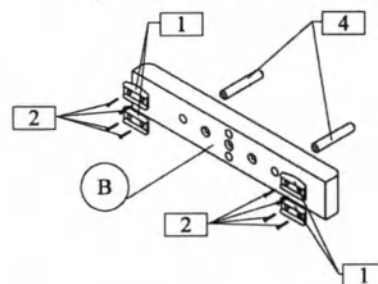


В x 1шт.

1 x 4шт.

2 x 8шт.

4 x 2шт.

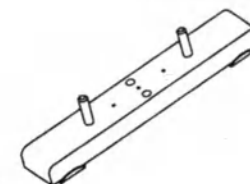


Повторить сборку для второй и третьей опоры

2 этап

Произведите сборку планки вертикальной 1

Рекомендации по сборке:

- шканты [4] на выносе установить в отверстия планки вертикальной 1 (А) обеспечив, примерно, равное выступание с обеих сторон планки.

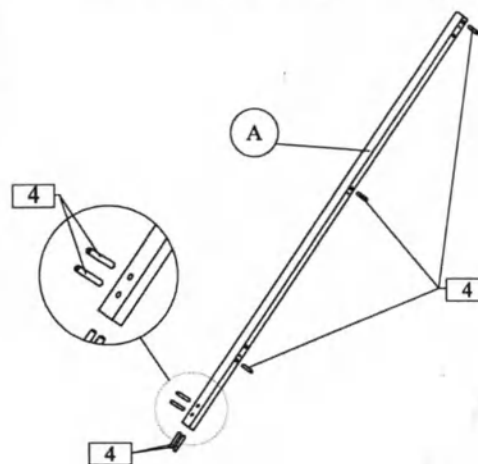

А x 1шт.

4 x 7шт.



Повторить сборку для второй планки вертикальной


2

3 этап

Произведите сборку планки вертикальной 2

Рекомендации по сборке:


- шканты [4] на выносе установить в отверстия планки вертикальной 2 (Ж) обеспечив, примерно, равное выступание с обеих сторон планки.

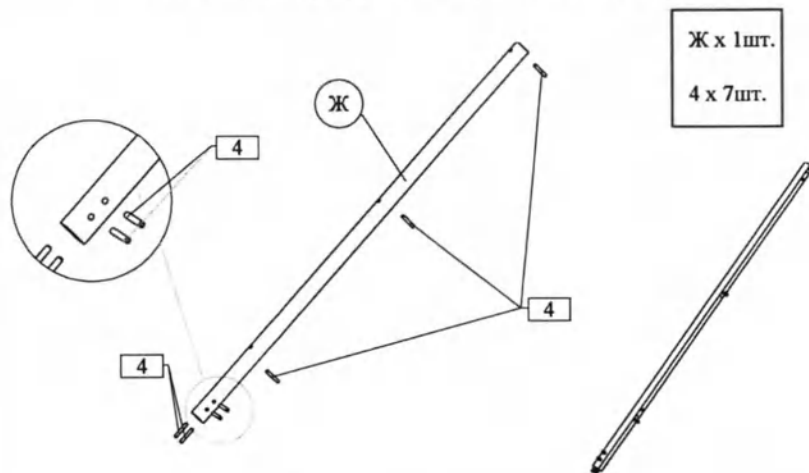

Ж x 1шт.
4 x 7шт.

Произведите сборку планки вертикальной 3

4 этап

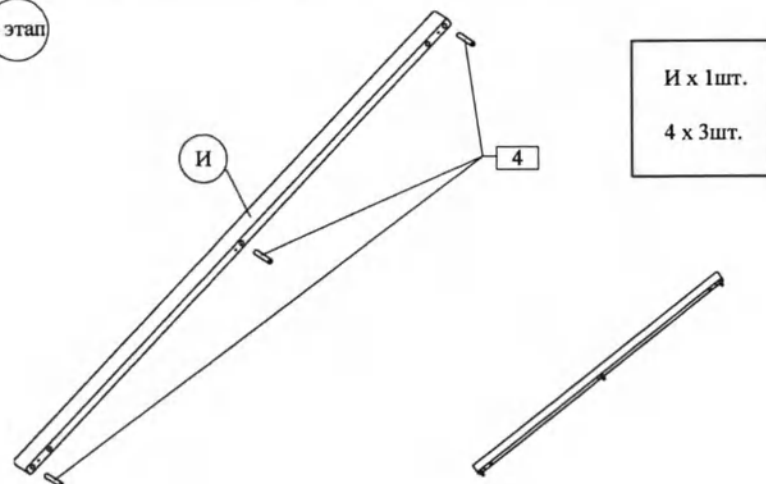

И x 1шт.
4 x 3шт.


3

5 этап

Закончить сборку планки вертикальной 1 и 2

Рекомендации по сборке:

- установите подпорки (Г) на панель вертикальную (А) в сборе;
- установите опору (В) в сборе и закрепите ее к планке вертикальной 1 (А) саморезами [3].

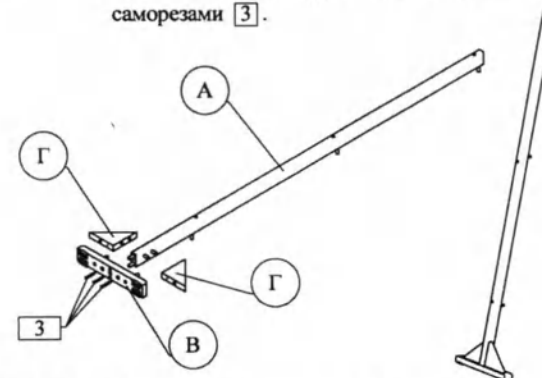

А или Ж x 1шт. (в сборе)
В x 1шт. (в сборе)
Г x 2шт.
3 x 3шт.


Завершить сборку второй планки вертикальной 1 (А)

Завершите сборку планки вертикальной 2 (Ж) аналогично вертикальной планке 1 (А)

Сборка правой секции

Рекомендации по сборке:

- установите поочередно планки горизонтальные (Б) на планку вертикальную (А) и закрепите их саморезами [3];
- установите, в предварительно собранную панель, перекладины (Д) и надвиньте на них полотно (Е);
- установите планку вертикальную (Ж) и закрепите ее саморезами [3];
- установите заглушки [5].

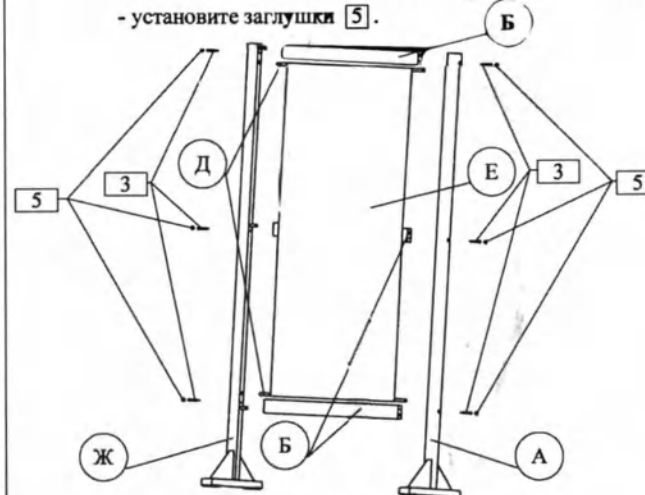

А x 1шт. (в сборе)
Б x 3шт.
Д x 2шт.
Е x 1шт.
Ж x 1шт. (в сборе)

3 x 6шт.
5 x 6шт.


4

Сборка левой секции

Рекомендации по сборке:

7 этап

- установите поочередно планки горизонтальные (Б) на плану вертикальную (А) и закрепите их саморезами (3);
- установите, в предварительно собранную панель, перекладины (Д) и надвиньте на них полотно (Е);
- установите планку вертикальную (И) и закрепите ее саморезами (3);
- установите заглушки (5).

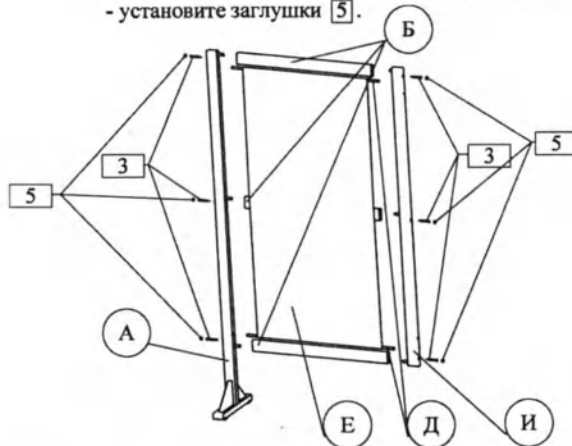

А х 1шт. (в сборе)
Б х 3шт.
Д х 2шт.
Е х 1шт.
И х 1шт. (в сборе)


3 х 6шт.
5 х 6шт.

Завершить сборку правой секции

Рекомендации по сборке:

8 этап

- установите (вверните) нижнюю часть петли (7) в отверстие планки ширмы до упора, обеспечив параллельность с планкой и направление оси-вверх
- повторите установку второй петли

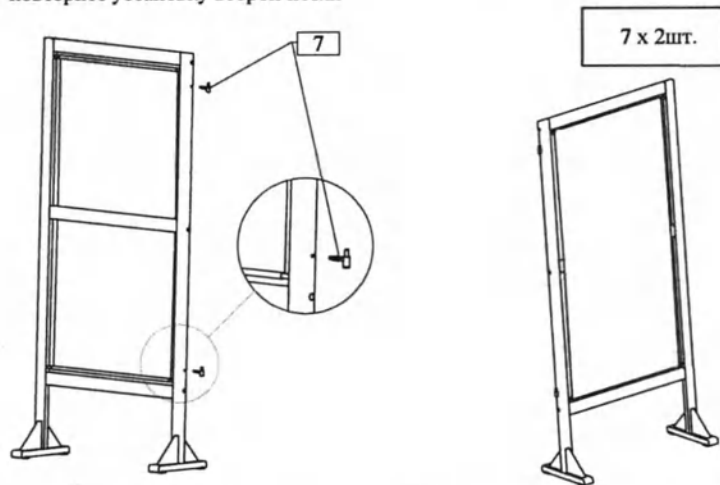


5

Завершить сборку левой секции

Рекомендации по сборке:

9 этап

- установите (вверните) верхнюю часть петли (8) в отверстие планки ширмы до упора, обеспечив параллельность относительно планки и направление отверстия петли -вниз.
- повторите установку второй петли

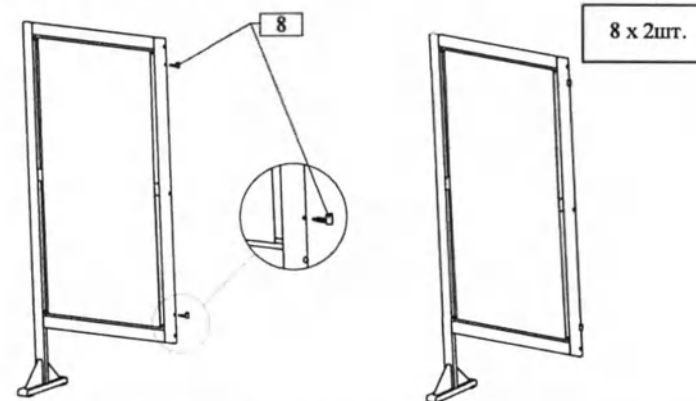


Сборка двойной ширмы

Рекомендации по сборке:

10 этап

- соедините обе секции (левую и правую) ширмы, совместив верхний и нижний части петель
- установите логотип организации (6), предварительно сняв защитную пленку

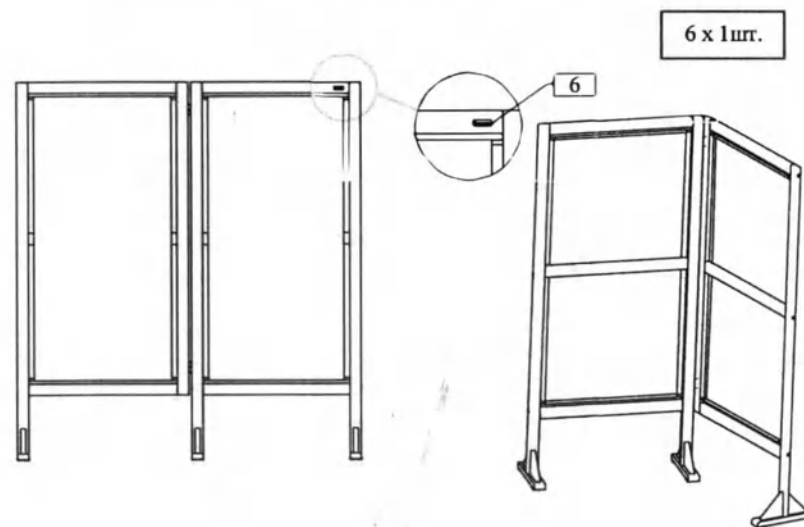

6

Инструкция по сборке изделия
Ширмы медицинские ГИКС 942810.113ТУ
Ширма медицинская (мод 5)

Условные обозначения:

- 1 А-Е: детали
 2 1 - 6 : крепеж и фурнитура
 3 1 - 5 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Планка вертикальная	2
Б	Планка горизонтальная	3
В	Опора	2
Г	Подпорка	4
Д	Переключатель	2
Е	Полотно	1

Крепеж и фурнитура

Обозн.	Кол-во	Обозначение	Рисунок
1	8	Подпятник мебельный	
2	16	Гвоздь	
3	12	Саморез 5x50	
4	18	Шкант 10x60	
5	6	Заглушка	
6	1	Логотип компании	

Изображения крепежа и фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в комплекте

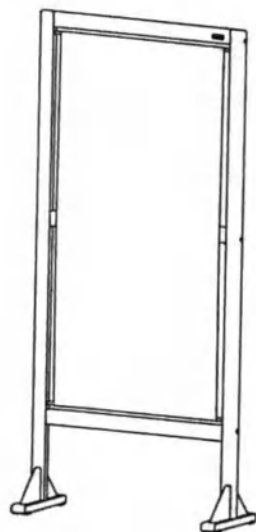



Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку опоры


Рекомендации по сборке:

- разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона от упаковки и на них производите сборку изделия
- закрепите гвоздями 2 подпятники мебельные 1 (расстояние от края опоры до подпятника 10 мм);
- установите шканты 4 (выступление шкантов за нижнюю плоскость опоры не допускается)

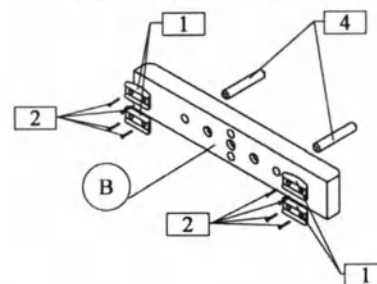

В х 1шт.

1 х 4шт.
 2 х 8шт.
 4 х 2шт.

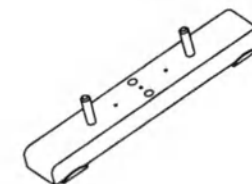


Повторить сборку для второй опоры

2 этап

Произведите сборку планки вертикальной

Рекомендации по сборке:

- шканты 4 на выносе установить в отверстия планки вертикальной А, обеспечив, примерно, равное выступание с обеих сторон планки.

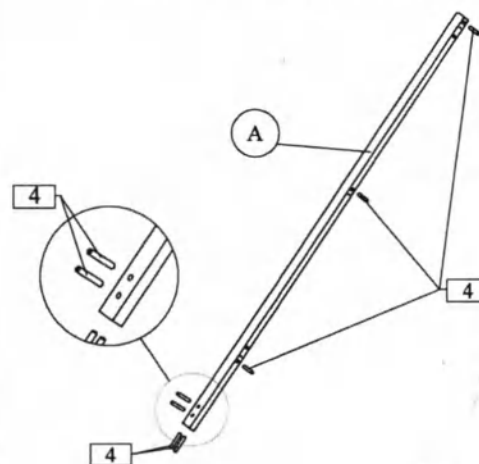

А х 1шт.

4 х 7шт.




Повторить сборку для второй планки вертикальной

3 этап

Закончить сборку планки вертикальной

Рекомендации по сборке:

- установите подпорки Г на панель вертикальную А в сборе;
- установите опору В в сборе и закрепите ее к планке вертикальной А саморезами 3.

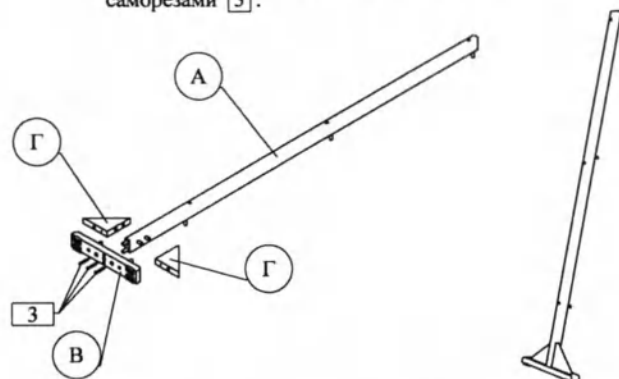


А х 1шт. (в сборе)
В х 1шт. (в сборе)
Г х 2шт.
3 х 3шт.

Завершить сборку второй планки вертикальной

Сборка ширмы одинарной

Рекомендации по сборке:

- установите поочередно планки горизонтальные Б на одну из двух планок вертикальных А и закрепите их саморезами 3;
- установите, в предварительно собранную панель, перекладины Д и надвиньте на них полотно Е;
- установите вторую планку вертикальную А и закрепите ее саморезами 3;
- установите заглушки 5.

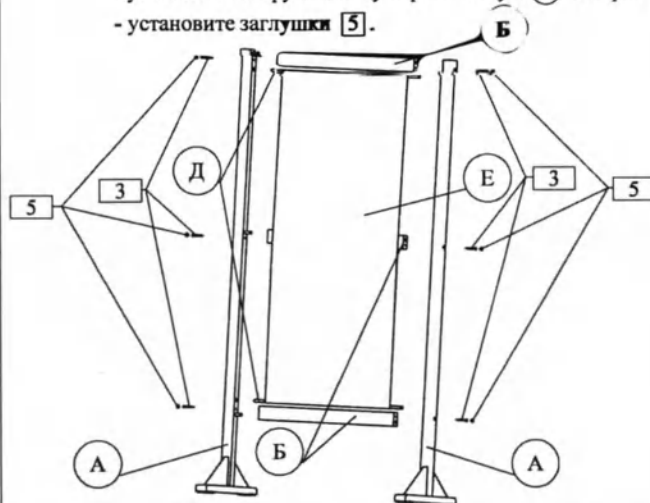

А х 2шт. (в сборе)
Б х 3шт.
Д х 2шт.
Е х 1шт.
3 х 6шт.
5 х 6шт.

3


5 этап

Окончательная сборка ширмы одинарной

Рекомендации по сборке:

- установите логотип компании 6;
- сборка ширмы завершена

6 х 1шт.

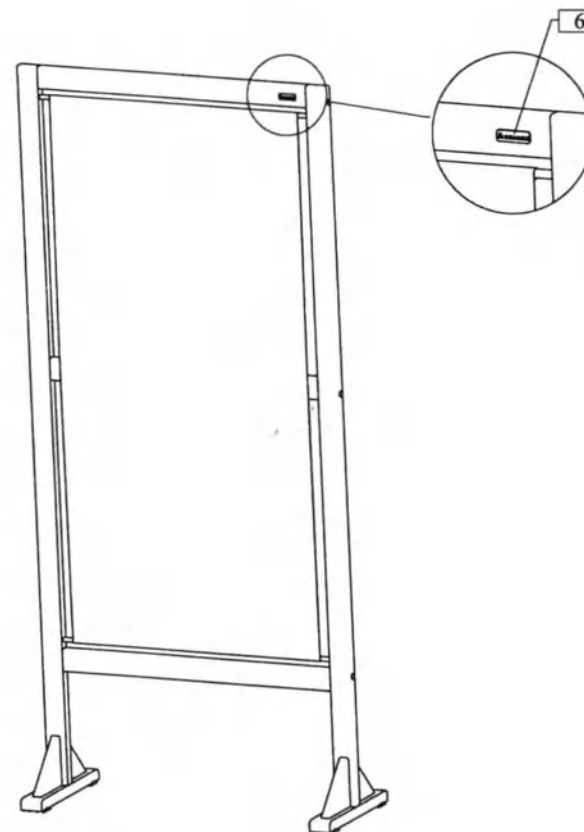

4


Инструкция по сборке изделия
Ширмы медицинские ГИКС.942810.113ТУ
Ширма медицинская (мод.6)

Условные обозначения:

- 1 А-И: детали
2 [1] - [8]: крепеж и фурнитура
3 [1] - [12]: этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Планка вертикальная 1	2
Б	Планка горизонтальная	9
В	Опора	4
Г	Подпорка	8
Д	Перекладина	6
Е	Полотно	3
Ж	Планка вертикальная 2 (с отверстием под петлю)	2
И	Планка вертикальная 3 (короткая под петлю)	2

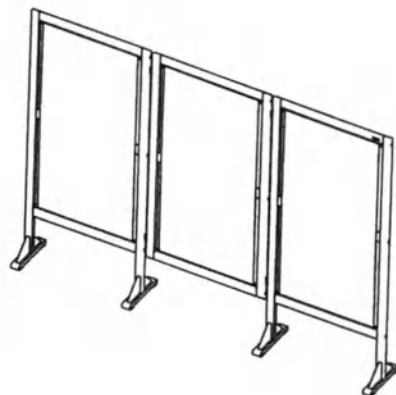

Крепеж и фурнитура

Обозн.	Кол-во	Обозначение	Рисунок
[1]	16	Подпятник мебельный	
[2]	36	Гвоздь	
[3]	30	Саморез	
[4]	30	Шкант	
[5]	18	Заглушка	
[6]	1	Логотип компании	
[7]	4	Петля ввертная (нижняя часть)	
[8]	4	Петля ввертная (верхняя часть)	

Изображения крепежа и фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в комплекте


Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку опоры


Рекомендации по сборке:

- разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона от упаковки и на них производите сборку изделия
- закрепите гвоздями [2] подпятники мебельные [1] (расстояние от края опоры до подпятника 10 мм);
- установите шканты [4] (выступление шкантов за нижнюю плоскость опоры не допускается)

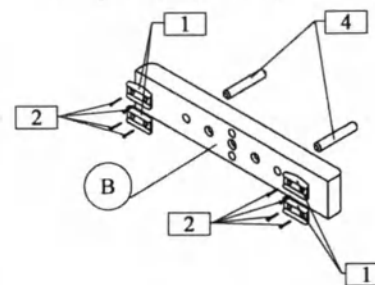

В x 1шт.

1 x 4шт.
2 x 8шт.
4 x 2шт.

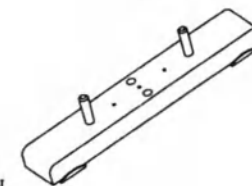


Повторить сборку для второй, третьей и четвертой опоры

2 этап

Произведите сборку планки вертикальной 1

Рекомендации по сборке:

- шканты [4] на выноске установить в отверстия планки вертикальной 1 (А) обеспечив, примерно, равное выступание с обеих сторон планки.

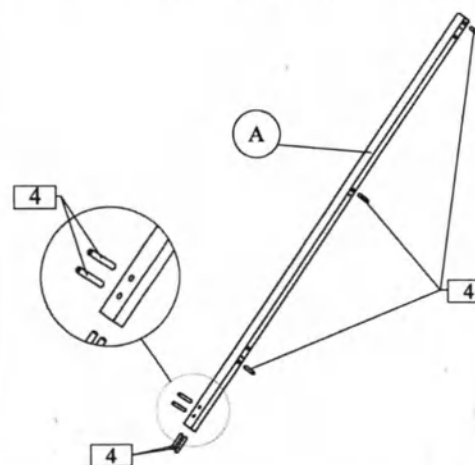

А x 1шт.

4 x 7шт.




Повторить сборку для второй планки вертикальной

3 этап

Произведите сборку планки вертикальной 2

Рекомендации по сборке:


- шканты [4] на выносе установить в отверстия планки вертикальной 2 (Ж) обеспечив, примерно, равное выступание с обеих сторон планки.

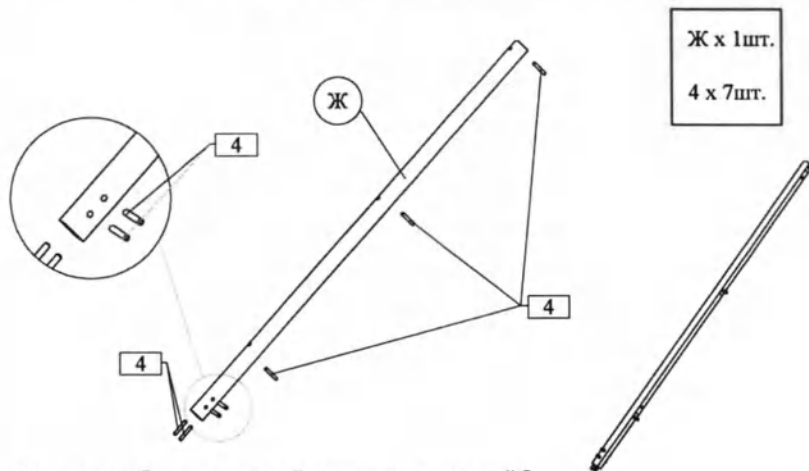

Повторить сборку для второй планки вертикальной 2

Произведите сборку планки вертикальной 3

4 этап

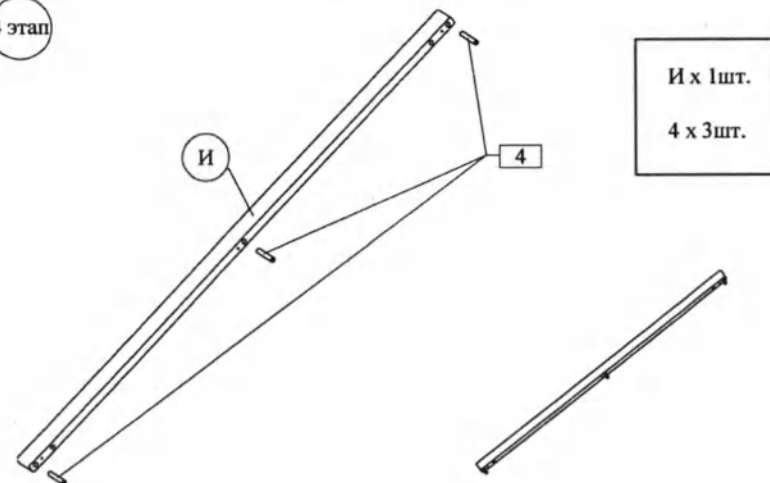

Повторить сборку для второй планки вертикальной 3


3

5 этап

Закончить сборку планки вертикальной 1 и 2

Рекомендации по сборке:

- установите подпорки (Г) на панель вертикальную (А) в сборе;
- установите опору (В) в сборе и закрепите ее к планке вертикальной 1 (А) саморезами [3].

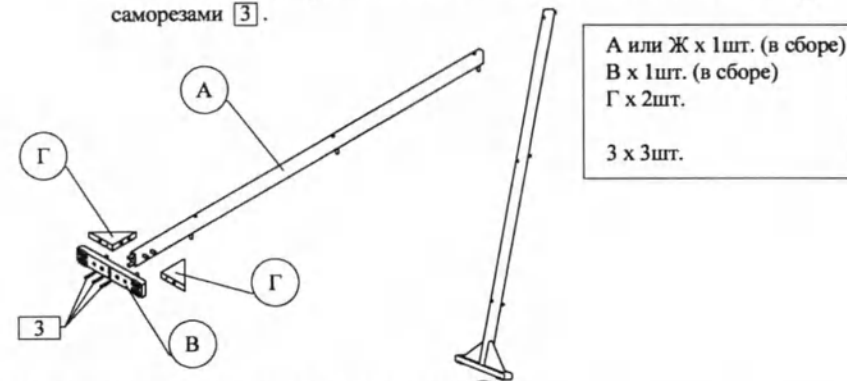


Завершить сборку второй планки вертикальной 1 (А)

Завершите сборку двух планок вертикальных 2 (Ж) аналогично планке вертикальной 1 (А)

Сборка правой секции

Рекомендации по сборке:

- установите поочередно планки горизонтальные (Б) на планку вертикальную 1 (А) и закрепите их саморезами [3];
- установите, в предварительно собранную панель, перекладины (Д) и надвиньте на них полотно (Е);
- установите планку вертикальную 2 (Ж) и закрепите ее саморезами [3];
- установите заглушки [5].

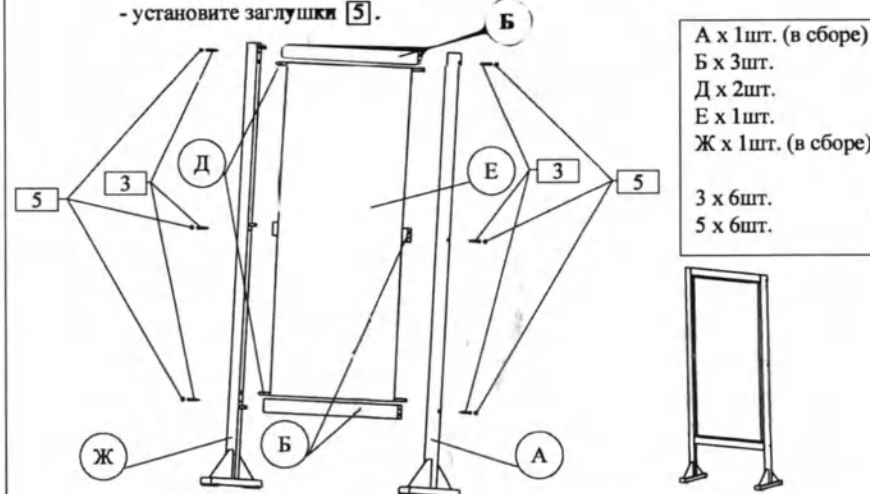


4

Сборка левой секции

Рекомендации по сборке:

7 этап

- повторить сборку согласно этапу 6 с учетом рисунка (смотри расположение панелей вертикальных 1 (А) и планки вертикальной 2 (Ж) относительно полотна (Е)

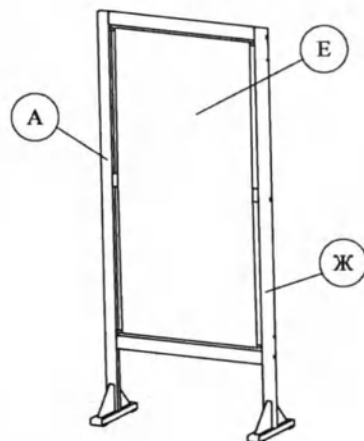

А х 1шт. (в сборе)
Б х 3шт.
Д х 2шт.
Е х 1шт.
Ж х 1шт. (в сборе)


3 х 6шт.
5 х 6шт.

Сборка центральной секции

Рекомендации по сборке:

8 этап

- установите поочередно планки горизонтальные (Б) на планку вертикальную 3 (И) и закрепите их саморезами (3);
- установите, в предварительно собранную панель, перекладины (Д) и надвиньте на них полотно (Е);
- установите вторую планку вертикальную 3 (И) и закрепите ее саморезами (3);
- установите заглушки (5).

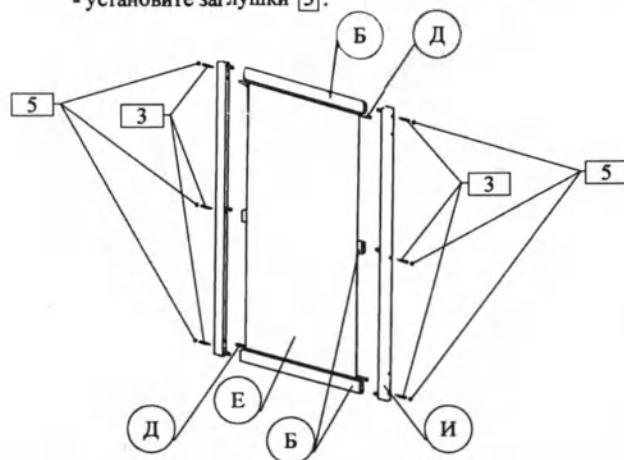

Б х 3шт.
Д х 2шт.
Е х 1шт.
И х 2шт. (в сборе)

3 х 6шт.
5 х 6шт.




5

Завершить сборку правой секции

Рекомендации по сборке:

9 этап

- установите (вверните) нижнюю часть петли (7) в отверстие планки ширмы до упора, обеспечив параллельность с планкой и направление оси-вверх
- повторите установку второй петли

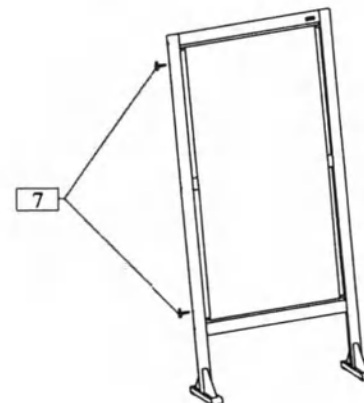

7 х 2шт.




Завершить сборку левой секции

Рекомендации по сборке:

10 этап

- установите (вверните) нижнюю часть петли (7) в отверстие планки ширмы до упора, обеспечив параллельность с планкой и направление оси-вверх
- повторите установку второй петли

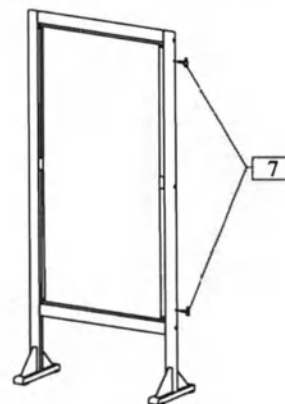

7 х 2шт.




6

11 этап **Завершить сборку левой секции**

Рекомендации по сборке:


- установите (вверните) верхнюю часть петли [8] в отверстие планки ширмы до упора, обеспечив параллельность относительно планки и направление отвестия петли -вниз.
- повторите установку второй петли

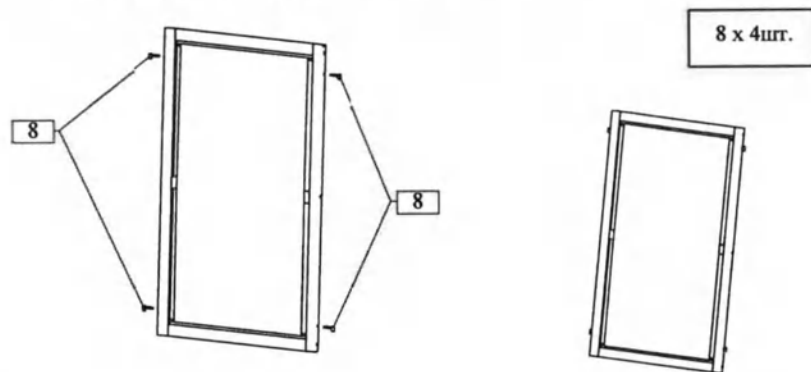

12 этап **Сборка двойной ширмы**

Рекомендации по сборке:

- соедините секции ширмы между собой, совместив верхний и нижний части петель
- установите логотип организации [6], предварительно сняв защитную пленку

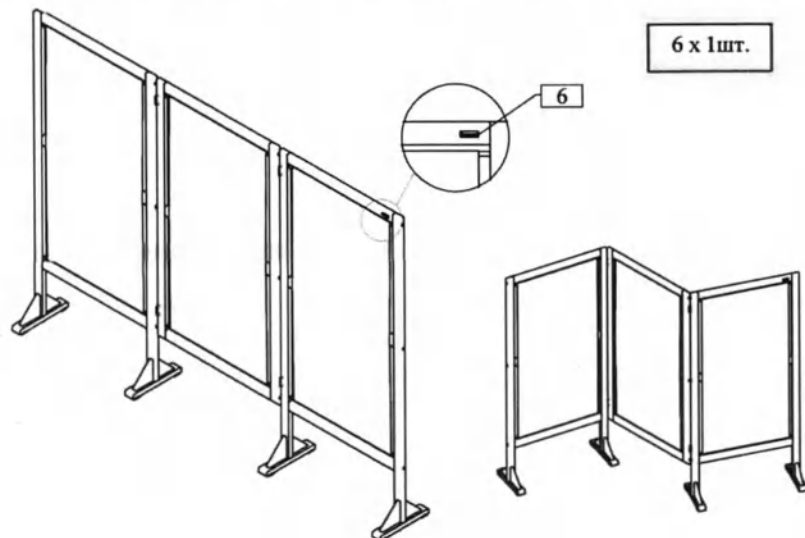

КОПИЯ
ВЕРНА

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 1 листа(ов).

Директор проектного офиса АО «ЕПЗ»

Крошкин М.В.

20 24

