

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Реабилитик»


А.А. Мухин
«04» августа 2019 г.



**Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной,
тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией
Rebq4el с принадлежностями**

по ТУ 32.50.30-005-27127705-2019

Руководство по эксплуатации и паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2	ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	7
3	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	8
4	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРОВАТИ	9
5	ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ	13
6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15
7	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
9	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	19
10	ГАРАНТИЯ	19
11	УТИЛИЗАЦИЯ	20
12	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ	20
13	МАРКИРОВКА	21
14	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	22
15	ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	22
16	ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ	23
	Приложение 1	27
	Приложение 2	29
	Приложение 3	71
	Приложение 4	72
	Приложение 5	75
	Приложение 6	77
	Приложение 7	78
	Приложение 8	79
	Приложение 9	80
	Приложение 10	81
	Приложение 11	82
	Приложение 12	83
	ПАСПОРТ	84

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед первым использованием кровати:

- Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы избежать повреждений, вызванных ошибочными действиями.
- Перед использованием протрите или продезинфицируйте кровать.

Данное Руководство содержит полную информацию о правилах безопасности, которым необходимо неукоснительно следовать. Все пользователи, работающие с медицинской кроватью, должны быть хорошо ознакомлены с этой инструкцией, и следовать всем указаниям о безопасном использовании.

1.1 Определение лиц и групп

Квалифицированный персонал по сборке кровати

Квалифицированный персонал должен ознакомиться с данной инструкцией.

Пользователь

Пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией.

Пациент

В данном Руководстве Пациентом названы недееспособные или нуждающиеся в уходе больные, занимающие эту кровать.

1.2 Информация о безопасности

Кровать представляет собой изделие, соответствующее современным технологиям.

Кровать медицинская механическая, четырехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией Rcbq4 с принадлежностями может быть использована только в случае абсолютной уверенности в ее исправном состоянии.

1.2.1 Интерпретация использованных символов

Знаки, предупреждающие о личной опасности:



Высокое напряжение, опасно для жизни.



Данный знак сообщает об опасности для жизни или здоровья.

Предупреждение об опасности ущерба для имущества



Этот знак сигнализирует о возможном ущербе для имущества.

Другие рекомендации



Общие замечания, призванные облегчить применение кровати и лучшего понимания принципов ее использования.

Символы безопасности не могут быть заменой ознакомлению с Руководством, вследствие чего внимательное прочтение и неукоснительное следование приведенной информации о безопасности, является необходимым.

1.2.2 Правила безопасности пользователей

• Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с кроватью, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы с кроватью перед ее применением. Необходимо привлечь внимание к возможности риска в случае неправильного использования кровати. В особенности это относится к электроприводу и поручням.

• Каждый раз перед использованием кровати проверять ее полную работоспособность.

• Убедиться, что никакие помехи, такие, как мебель, скошенный потолок, подоконники и т.п., не препятствуют регулировке кровати.

• При использовании дополнительного или вспомогательного оборудования – опорных штанг, ламп для чтения, компрессоров для противопролежневой системы и пр. необходимо удостовериться, что это не приведет к спутыванию кабелей питания.

• В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования кровати, необходимо произвести проверку.



1.2.3 Правила безопасности для пользователей

• Проводить кабель питания таким образом, чтобы не допускать натягивания, перекреста, повреждения движущимися частями во время манипуляций с кроватью.

• Перед перемещением кровати ее необходимо отсоединить от сети. Кабель должен быть помещен в кронштейн (держатель) во избежание его падения или волочения по полу.

• Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения (повесить на крюк); необходимо также удостовериться, что кабель не будет поврежден движущимися частями кровати.

• Всегда проверять, переведен ли ложемент в нижнее положение перед тем, как пациент будет оставлен без внимания. Таким образом, можно предотвратить травмирование пациента в случае падения при вставании с кровати или укладывании на нее.

• Чтобы обезопасить пациентов, от непредвиденных автоматических смещений, необходимо, чтобы пульт находился в недоступном месте (например, у изножья кровати) если:

- Пациент не в состоянии безопасно манипулировать кроватью или не может обезопасить себя от потенциально опасных положений;

- Если пациент подвергается риску непреднамеренного движения привода;

- Если ограждения подняты (риск сдавливания или захвата конечностей при корректировке секций);

• Необходимо регулярно проводить визуальную проверку состояния сетевого кабеля на наличие механических повреждений (истирание, оголенные провода, изгибы, точки пересечения и т.д.) Такая проверка должна осуществляться, если:

- Кабель подвергается механической нагрузке (когда его переезжает кровать или тележка для перевозки оборудования, в случае изгиба, растяжения или резких рывков при перемещении кровати, подключенной к сети);

- Кровать перемещается перед включением ее в сеть;

- Проверка также должна проводиться пользователем при постоянном использовании.

• Чтобы обезопасить пациентов, от непредвиденных автоматических смещений, необходимо, чтобы механизмы регулировки кровати были надежно зафиксированы, в момент когда не используются.

• Регулярно проверять фиксаторы для разгрузки натяжения главного кабеля чтобы убедиться, что винты закреплены должным образом.

1.3 Описание изделия

Кровать выпускается в следующих исполнениях: см. Приложение 1.

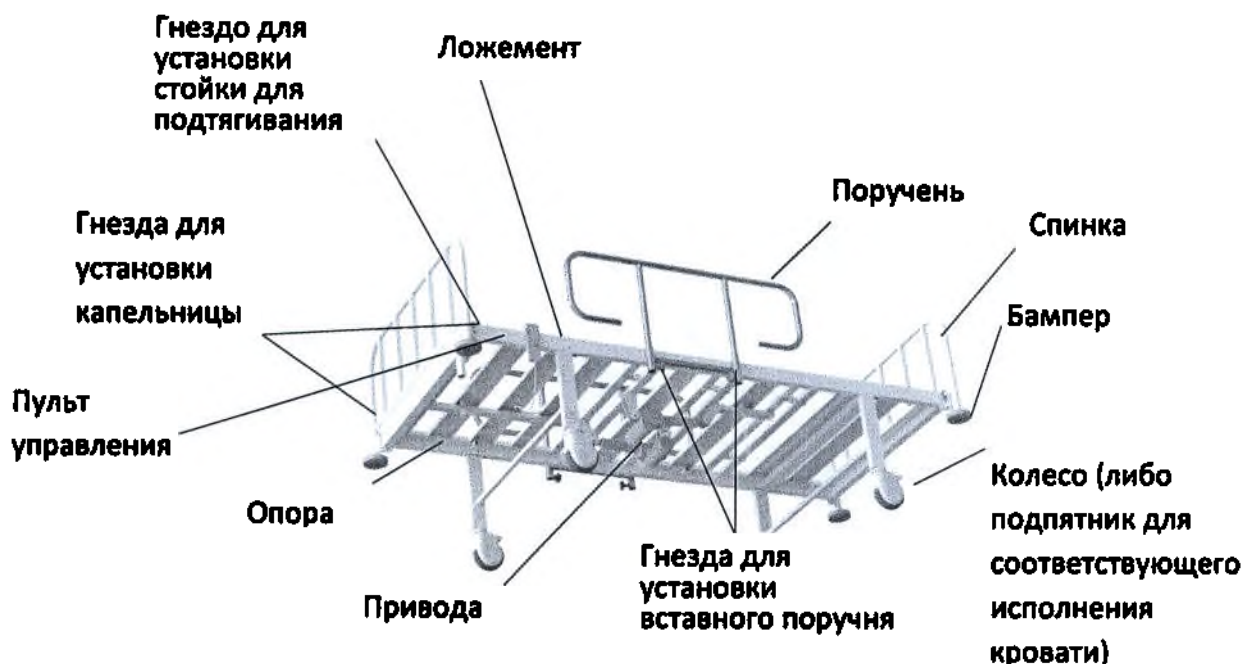


Рисунок 1. Общий вид кровати

1.3.1 Назначение

• Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией Rebq4el с принадлежностями (далее – кровать, изделия), предназначена для размещения лежащих пациентов и обеспечения физиологически правильного расположения больного.

• Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а также домашние условия.

• Показания к применению:

- размещение лежащих пациентов;
- обеспечение физиологически правильного расположения больного.

• Противопоказания к применению: отсутствуют.

• Безопасная номинальная нагрузка на кровать составляет 150 кг, основанная на весе пациента и весе матраса и дополнительными аксессуарами.

• Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

1.3.2 Комплект поставки

Комплект поставки кровати представлен в приложении 2.

Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей не входящих в комплект может привести к увеличению эмиссии радиопомех и снижению помехоустойчивости.

Кровать с ложементами

Рама разделена на секции: спинную, тазобедренную, икроножную и неподвижную промежуточную. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка осуществляется приводами, с помощью пульта управления.

Электрическая регулирующая система

Приводная система кровати защищена от сбоев, является пожаробезопасной, состоит из:

- блока управления, трансформирующего 220В в напряжение 24В, безопасное для пациентов и пользователей.

Блок управления напрямую питает все электроприводы и пульт управления с помощью соединительных кабелей.

- 2-х и 3-х приводов (в случае регулировки высоты кровати) – для регулировки спинной, тазобедренной секций, высоты и наклона кровати.

- пульта управления.

Поручень

Для предотвращения падения пациента с кровати предусмотрены поручни с обеих сторон, которые служат барьером и по мере необходимости могут убираться.

Поручни могут быть: - поручень вставной;

- поручень с деревянной вставкой;

- складной поручень;

- пластмассовый малый поручень;

- пластмассовый большой поручень.

Стойка для капельницы

Для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемых при проведении лечебных процедур.

Стойка для капельницы может быть: - стойка для капельницы из нержавеющей стали с 2-мя складными крючками;

- стойка для капельницы из покрашенной стали с держателями.

Стойка для подтягивания

Для самостоятельного принятия пользователем более удобного положения в кровати.

Лестница для подтягивания

Для самостоятельного принятия пользователем сидячего положения в кровати.

Принадлежности:

Полка

Для размещения судна.

Центральный тормоз

Для единой регулировки тормозной системы колес.

Столик

Для размещения инструментов, медикаментов, дезинфицирующих средств, туалетных принадлежностей и т.п.


Крючок-держатель

Для размещения мочеприсоса.


2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Сборка и установка кровати осуществляется квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем медицинского изделия.


Поскольку кровать может быть переведена в наклонное (опущенный ножной конец при поднятом головном) положение, очень важно убедиться в том, что головная и ножная части не перепутаны. Соответствующие наклейки находятся на:

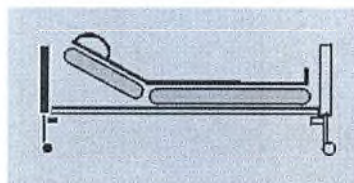

Наклейка головного конца находится на изголовье кровати

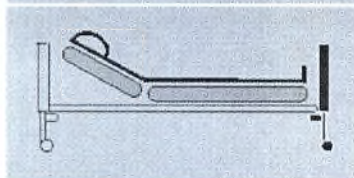

Наклейка ножного конца находится на изножье кровати

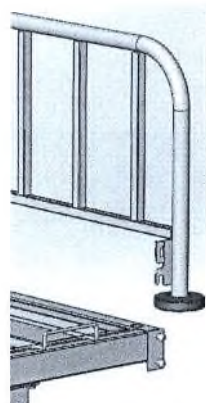

2.1 Установка аппаратных колес (при эксплуатации исполнения с колесам)

Ввернуть колеса в торцы опор. Применить одно колесо с тормозом и одно – без. Для лучшей фиксации кровати рекомендуется устанавливать колеса с тормозом по диагонали. Колеса снимаются с блокировки только при необходимости переместить кровать.

2.2 Установка спинок

По углам рамы кровати имеются два опорных штыря. Для установки спинок поднимите фиксаторы установочных пластин на спинках и опустите спинку на штыри, после чего опустите фиксаторы.

2.3 Установка поручней

2.3.1 Установка складного поручня

Прикрутить складной поручень к раме кровати, совместив отверстия на нижней трубе поручня с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х50 с плоск.гол. с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн. винт. Zn. См. рис. 1.

2.3.2 Установка вставного поручня

Прикрутить держатель поручня к раме кровати, совместив отверстия на трубе держателя с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn. Чтобы установить поручень в рабочее положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.3 Установка вставного поручня с деревянной вставкой

Прикрутить держатель поручня к раме кровати, совместив отверстия на трубе держателя с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn. Чтобы установить поручень в рабочее положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.4 Установка пластикового поручня (большого или малого)

Прикрутить поручень к раме кровати, совместив отверстия на крепежной пластине поручня с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебели.винт. Zn.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.5 Электрические соединения

Все приводы работают напрямую от блока управления, который подключен к электрической сети.

Убедитесь в том, что кабели не повреждены, не образуют петель и не заземлены деталями кровати.

Установка аксессуаров

Установить аксессуары на места, указанные на рисунке 1. Гнездо для установки стойки для подтягивания, снабжено болтовым фиксатором, который для фиксации стойки необходимо закрутить.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- Колеса заблокированы (для исполнения с колесами);
 - Источник питания соответствует номинальному (220 В, 50 Гц);
 - Кабель питания подсоединен и проложен таким образом, что его повреждение исключено;
 - Кабели питания приводов и пульта управления не могут быть повреждены при перемещении кровати;
 - Никакие препятствия – ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. – не мешают регулировке.
 - Все регулировочные функции проверены и действуют исправно.
- Только после этого можно приступить к использованию кровати.

3.1 Требования к расположению

• В помещении должно быть достаточно места для полноценной регулировки кровати. Мебель, подоконники и пр. не должны препятствовать регулировке.

• Перед использованием кровати на паркетных полах следует проверить, не приведут ли колеса к обесцвечиванию или другому ущербу. Желательно, чтобы пол помещения был покрыт плиткой, ламинатом или линолеумом.

• Надлежащим образом установленная розетка бытовой электросети должна быть расположена достаточно близко к кровати (предпочтительно).

• При соединении дополнительных электроприборов (компрессоры противомоскитной системы и т.д.) необходимо удостовериться в их функциональности и в том, что они надежно закреплены. В этом случае особое внимание должно быть обращено на безопасную прокладку кабелей, шлангов и пр.

• При расположении кровати следует обратить особое внимание на следующие пункты с целью минимизации возможного риска.

• Желательно использовать только огнестойкие матрасы и постельные принадлежности:

• Следует воздерживаться от курения, поскольку матрас и постельные принадлежности могут не быть дымозащитными;

• Дополнительные изделия (такие, как обогревательные одеяла, к примеру) должны быть в исправном рабочем состоянии;

• Следует следить за тем, чтобы данное обогревательное оборудование применялось по прямому назначению, и чтобы никакие изделия не были забыты на или под кроватью во избежание перегрева;

• Желательно избегать применения штепсельных колодок и удлинителей – из-за возможности просачивания жидкостей.

3.2 Готовность к использованию

- Перед первым использованием кровати, а также при ее повторном применении следует провести ее очистку и дезинфекцию в соответствии с гл. 5.
- После успешного завершения пп 3.1 – 3.2 кровать можно использовать по назначению.

4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРОВАТИ

4.1 Специальные правила безопасности для регулировочных механизмов



- При регулировке кровати необходимо следить за тем, чтобы конечности пациентов, пользователей или других лиц, не находились под секциями или ложем, поскольку возможен их захват с последующим травмированием.

• При использовании вспомогательного оборудования всегда необходимо проверять следующее: вспомогательное оборудование не создает сдавливающих или срезающих зон, представляющих опасность для пациента при регулировке спинной, тазобедренной и икроножной секций.

- Убедиться, что кабели питания и пульта управления не подвергнутся повреждению.

• Перед перемещением кровати убедиться в том, что кабель питания не будет растянут, прижат колесом или поврежден каким-либо другим способом. При перемещении кровати кабель должен быть зафиксирован в держателях (кронштейнах).

• Во избежание повреждений убедиться в том, что никакие препятствия, как, к примеру, мебель или скошенный потолок, не мешают регулировке.

• Продолжительность операций не должна превышать двух минут. После этого должен быть период покоя длительностью не менее 18 минут. (альтернатива: минута активности с последующими 9 минутами покоя и т.д.).

• Как и любое электрическое устройство, приводная система кровати может порождать помехи и помехи в работе других электромагнитных устройств. В этом случае следует увеличить расстояние до таких устройств или не использовать одну и ту же розетку электрической сети.

4.2 Применение пульта

	Регулировка спинной секции Нажатием этих клавиш можно изменять угол спинной секции.
	Регулировка тазобедренной секции Изменение угла тазобедренной секции.
	Регулировка икроножной секции Изменение угла наклона икроножной секции
	Регулировка высоты ложа Выбор высоты матрасного основания.



Стрелки на пульте управления указывают направление движения при нажатии соответствующей кнопки

4.3 Колеса (в случае исполнения кровати с колесами)

Медицинская кровать оснащена четырьмя колесами, два из которых с индивидуальными тормозами.



внимание

- При перемещении кровати ложе должно находиться в низшем положении.

Разблокировка: Толкнуть ногой переключатель отпуска тормоза в направлении ножки кровати.

Блокировка: Нажать ногой рычаг торможения.



← Отпуск тормоза Разблокировка

↓ Торможение

Два колеса на кроватях снабжены отдельным тормозом. Колеса блокируются, пока педаль тормоза фиксирует их в неподвижном положении. Тормоз отключается нажатием на разблокировочную педаль. Колеса кровати должны быть заблокированы, если необходимо, чтобы кровать находилась в неподвижном состоянии.

4.4. Держатель для подвесного кабеля



Кронштейн (держатель) кабеля питания расположен на боковой стороне ложа у подножия кровати.

- Кабель необходимо подвешивать на кронштейн каждый раз перед перемещением кровати для предотвращения его повреждения в результате обрыва, наезда колеса или раздавливания. Последнее может привести к опасности электрического поражения или потере функциональности.

4.4 Регулировка секций

В обычном случае, когда необходимо приподнять головную секцию, пользователю следует использовать пульт управления. Нажатием на соответствующую выбранной секции кнопку «вверх» на пульте управления секции будут подниматься; нажимайте на кнопку «вниз» выбранная секция будет опускаться. Остановить поднятие или опускание секций можно в любом положении.

Также на пульте есть кнопка «одновременный наклон спинной и ножной секции». Из горизонтального положения ножная секция поднимается автоматически вместе со спинной.

4.5 Поручни

4.5.1 Складной поручень

Положение складного поручня регулируется кнопкой, находящейся в верхней его части. Удерживая кнопку, установить поручень в нужное положение (опущенное (сложенное) или поднятое).

4.5.2 Вставной поручень

Вставной поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

4.5.3 Поручень вставной с деревянной вставкой

Поручень с деревянной вставкой имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

4.5.4 Пластиковый поручень (большой и малый)

Пластиковый поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, нужно потянуть его вверх. Чтобы опустить поручень, необходимо отжать фиксатор.

Не используйте поручни в качестве опоры!

Правила безопасности при пользовании поручней

Боковые поручни служат для того, чтобы обезопасить пациента от случайного падения с кровати. Они не предназначены для того, чтобы помешать пациенту сойти с кровати. В таких случаях надо обратить особое внимание на следующие правила:

- Необходимо пользоваться только исправными неповрежденными боковыми поручнями.
- Удостовериться в том, что применяются поручни, поставляемые непосредственно с кроватью.
- При использовании кровати с поручнями необходимо принять во внимание соответствие ее характеристик телосложению пациента. Следует учесть расстояние между планками и крестовинами в отношении к конституции пациента. Для людей с небольшими размерами необходимо предусмотреть дополнительные предохранительные средства (в комплектацию данной модели такие средства не входят). Это может оказаться единственным способом предупреждения защемления пациента или его проскальзывания между планками.
- Регулярно проверять состояние боковых поручней и механических компонентов, осуществляющих их закрепление на ходовой части на наличие повреждений. Такая проверка должна проводиться не только перед установкой поручней, но также во время их применения на регулярной основе (по меньшей мере во время повторного использования).
- Чтобы обезопасить пациента от случайных автоматических регулировок необходимо всегда блокировать регулировку управления спинной секции при боковых поручнях (для устранения опасности зажатия и сдавливания конечностей).

Если эти правила не будут соблюдаться, это создаст опасность застревания конечностей пациента в боковых поручнях или его падения сквозь промежутки между планками, если они слишком велики в случае несоответствия размеров ограждений или при их неполном соединении.

4.6 Лестница для подтягивания

Лестница для подтягивания используется пациентом для самостоятельного поднятия из лежачего положения. Пациент приподнимает тело, поочередно цепляясь за перекладины. Лестница крепится в ножной части кровати с помощью удлиненных концов веревки.

4.7 Стойка для подтягивания

В головной части рамы кровати находятся два гнезда для расположения стойки для подтягивания.

Установка

Установить стойку в специально предназначенное гнездо (см. рис. 1). Зафиксировать положение болтовым фиксатором.


Демонтаж

Выкрутить болтовой фиксатор. Вытащить стойку в направлении вверх.

Пределы вращения стойки. Раскачивание стойки вне площади, занимаемой кроватью, может привести к ее опрокидыванию при приложении веса к штанге. Для предотвращения этого убедиться, что болтовой фиксатор закручен надежно.

Регулировка высоты опорной ручки.

Длина ремня опорной ручки может меняться в пределах 33-93 см с помощью регулировочных стяжек.

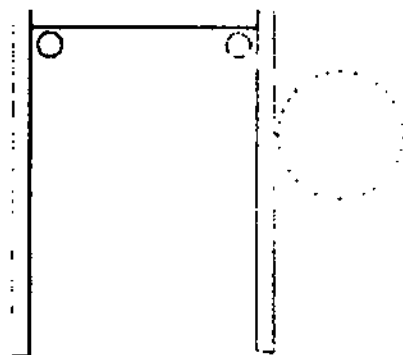

4.8 Стойка для капельницы

Капельница устанавливается в одно из четырех гнезд, указанных на рисунке 1.

4.9 Полка

Полка устанавливается под рамой кровати с ложементом на одну из опор. Крюки полки надеваются на поперечную трубу опоры.

4.10 Столик

Столик устанавливается на поручни кровати. Пластиковые опоры столика служат одновременно ограничителями движения при расположении его на поручнях.

4.11 Центральный тормоз (для исполнения с колесами)

Кровать оснащается центральной тормозной системой колес с единой педалью регулировки. Рама тормозной системы устанавливается на месте опор с помощью прилагаемого крепежа.

Три (из четырех) колеса с двухпозиционной центральной тормозной системой (С2), которая блокирует колесо и поворотный узел+полная разблокировка. Одно (из четырех) колесо с трехпозиционной центральной тормозной системой (С3), которая блокирует колесо и поворотный узел, либо только поворотный узел, либо полная разблокировка. Управление тормозной системой происходит через кулачковый механизм в стержне фиксации диаметром 28 мм.

4.12 Крючок-держатель

Крючок – держатель навешивается на раму кровати и служит для размещения мочеприемника.

4.13 Экстренное опускание спинной секции

В случае прекращения энергообеспечения или нарушений в работе электропривода спинная секция может быть опущена вручную.

Для этого необходимы два человека!



Экстренное опускание может быть произведено только в случае крайней необходимости и только надлежащим образом, для этого необходимо предварительно потренироваться без лежащего на кровати пациента и полностью овладеть нижеописанными процедурами.

Несоблюдение этих правил может привести к неконтролируемому падению спинной секции, которое может причинить серьезные травмы.

В качестве предупредительной меры можно рекомендовать практиковаться в экстренном опускании в нормальных условиях с тем, чтобы в случае необходимости можно было бы действовать быстро и точно.

- Перед опусканием надо удалить все грузы с секции.
- Для этого один из участников должен приподнять секцию, держа ее за внешние края головной части и удерживать ее.
- Второй же участник должен снять крепежную фурнитуру из подъемной трубы мотора спинной секции. Мотор таким образом изолируется, после чего спинная секция может быть опущена вниз.
- После того, как второй участник покинул опасную зону, первый может осторожно опустить спинную секцию.



Спинную секцию следует крепко удерживать во избежание ее падения.

Для восстановления первоначального состояния кровати крепежная фурнитура должна быть заново закреплена.

5 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

5.1 Общая информация

Очистка – это самое важное средство и требование для успешной химической дезинфекции. Когда кровать используется одним и тем же пациентом, рутинная очистка кровати весьма существенна для обеспечения гигиенической обстановки. Дезинфекция ходовой части необходима только в том случае, когда она видимо загрязнена инфекционными или потенциально инфекционными материалами (кровь, стул, гной) или, при инфекционной болезни, по указанию врача. Кровать должна быть протерта и продезинфицирована перед тем, как ее займет новый пациент!



Перед очисткой и дезинфекцией

- Отсоединить кабель питания и упаковать вилку таким образом, чтобы исключить попадание воды и водных растворов.
- Убедиться, что все разъемы вставлены полагающимся образом.
- Электрические компоненты не должны иметь видимых повреждений. В противном случае проникновение воды или водных растворов может привести к их порче.
- Перед возобновлением пользования кроватью убедиться в отсутствии остаточной влаги просушкой или продувкой кабеля питания.
- Электрические компоненты не должны промываться струей воды или воздухом под давлением; их можно только протирать влажной тканью.
- В случае подозрения на попадание воды на электрические компоненты следует сразу же отключить кабель питания, принять меры к тому, чтобы он не был вновь включен.
- Несоблюдение этих правил может привести к порче оборудования и привести к перебоям в работе.

5.2 Инструкции по очистке и дезинфекции

- Снять постельное белье и отправить в прачечную.
- Прочистить все поверхности, включая реечную раму (ламели) кровати мягким экологически чистящим раствором.
- Если кровать загрязнена инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать ее протиркой агентами, одобренными СЭС и пригодными для соответствующих поверхностей. Дезинфекция колес должна производиться только в том случае, если они видимо загрязнены инфекционными или потенциально инфекционными материалами.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только в больницах, при наличии у пациента мультирезистентного патогенна.

Дезинфекция кровати непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистых» и «грязных» кроватей при их транспортировке. Это в свою очередь, предотвращает распространение внутрибольничных болезнетворных микроорганизмов, что может быть обеспечено следованием данным рекомендациям.

Неиспользуемая кровать должна быть отправлена на хранение в накрытом состоянии, для предохранения ее от загрязнения.

5.3 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы кровати следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуются протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.



• Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

5.3.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.
- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.
- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.
- После завершения дезинфекции провентилировать помещение.
- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление, при котором выделяются большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.
- Кроме того, протирка имеет более существенное значение.

5.4 Метод дезинфекции

Дезинфекцию проводят протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% универсального моющего средства, при температуре раствора не менее плюс 18 °C, два раза с интервалом между протираниями 10 -15 минут.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 6 лет в зависимости от условий и частоты применения.



Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

С этой целью необходимо проводить регулярный осмотр кровати для обеспечения постоянной гарантии ее безопасности и проверки работоспособности, как описано ниже.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

Рекомендации:

Ежемесячная проверка всех механических компонентов.



В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

6.1 Замена электрических компонентов



Опасность электрического поражения!

- До начала какой-либо работы следует отключить кабель питания от источника напряжения.
- Любая работа на приводе или его ремонт могут производиться только инженером по техобслуживанию, производителем или авторизованным квалифицированным электриком.



- Разбирать систему электропривода можно только в том случае, когда матрасная рама находится в горизонтальном положении. В противном случае есть опасность травмы в результате падения рамы.

Все компоненты электропривода не подлежат техобслуживанию и не могут быть открыты. В случае любой неисправности они должны быть целиком заменены.

Для поддержания работы и для осуществления гарантийных обязательств должны использоваться только оригинальные изделия.

7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требованием о техобслуживании или ремонте.

Таблица устранения неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Не работает пульт управления или приводная система	• Кабель питания не включен в сеть; • Нет подачи напряжения в сети; • Разъем пульта управления включен не правильно; • Пульт или приводное устройство не исправны.	• Включить кабель в источник питания; • Проверить напряжение в сети; • Проверить коннекторы на пульте; • Проинформировать оператора о неисправности.
Электропривод работает только в течение короткого времени	• Кровать перегружена излишним весом.	• Разгрузить кровать.

пока нажаты клавиши.		
Приводы работают только в одном направлении	• Неисправный пульт, привод или блок управления.	• Сообщить оператору о необходимости ремонта.
При нажатии клавиш пульта активируется неправильная функция.	• Перепутаны выходы привода.	• Сообщить об этом оператору
Резкая остановка привода при длительной регулировке.	• Перегрев приводной системы	• Оставить приводную систему в состоянии покоя на 20-30 минут (охлаждение).



При использовании боковых ограждений или стойки для капельницы на электрически регулируемых кроватях необходимо обратить особое внимание на следующее: Убедиться, что дополнительные устройства не создают сдавливающих или срезающих условий для пациента при регулировке спинной или тазобедренной секции. Если это невозможно, следует принять меры для предотвращения нежелательных последствий.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Нормы технологичности кровати – по ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201.

8.2 Конструкция кровати должна обеспечивать удобное размещение на ней пользователей, а также обеспечение доступа к отдельным сборочным единицам и деталям, которые могут быть заменены в процессе эксплуатации и взаимозаменяемость этих изделий.

8.3 Несущие конструкции кровати должны изготавливаться замкнутого сечения. Накладные, декоративные элементы мебели закреплены неподвижно.

8.4 Кровать должна характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с её назначением, и должна отвечать необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

8.5 Все сварные швы должны быть непрерывными и сплошными, на видимой поверхности кровати не допускаются дефекты сварных соединений.

8.6 Фурнитура, выходящая на поверхность кровати, должна быть без заусенцев.

8.7 Наружная поверхность кровати не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей.

8.8 Кровать должна выдерживать номинальную нагрузку 150 кг, равномерно распределенную на секции и не иметь после сильной нагрузки остаточной деформации.

8.9 Механическая прочность кровати должна быть не менее 300 кг.

8.10 Кровать может быть оснащена 4-мя колесами диаметром $125 \pm 0,5$ мм (или стоять на подпятниках). Все колеса должны быть самоориентирующимися и легко без заеданий проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна.

8.11 Кровать может быть оборудована центральным тормозом, обеспечивающим удержание кровати с пациентом в неподвижном состоянии.

8.12 Колеса не должны оставлять на полу помещения никаких отпечатков.

8.13 Усилие, прилагаемое к тормозному устройству колес, должно быть не более 100 Н.

8.14 Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки, приложенное к спинке в направлении движения вдоль плоскости пола, должно быть не более 100 Н.

8.15 Центральный тормоз, должен удерживать от перемещения кровать, с размещенной на ней номинальной нагрузкой, при приложении усилия до 300 Н.

8.16 Усилия, прилагаемые к рукояткам механизмов изменения углов наклона секций, с размещенной на них номинальной нагрузкой, не должны превышать 50 Н.

8.17 Секции кровати при заданных углах наклона должны надежно фиксироваться.

Самопроизвольное изменение углов наклона секций с размещенной на них номинальной нагрузкой не допускается.

8.18 Кровать может быть оснащена амортизаторами (бамперами), установленными на спинках, предохраняющими защитные покрытия кровати и стены помещений от ударов и повреждений.

8.19 Секции кроватей должны быть оснащены скобами, удерживающими матрац.

8.20 Кровати должны стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес (или одной из ножек) не должно быть более 3 мм.

8.21 Съемные приспособления должны крепиться к кровати без применения специального инструмента. Усилия фиксации съемных приспособлений – не более 100 Н.

8.22 При изготовлении кровати и её компонентов должна обеспечиваться точность, позволяющая осуществить сборку без дополнительных подгонок.

Габаритные размеры кровати и её масса должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Вид оборудования	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм		Угол наклона секции к гориз., угл. град.			Масса без доп. оборудования, не более, кг.	
			не подъемная	подъемная	спинной	тазобедренной	икроножной	не подъемная	подъемная
Кровать Rebo4el	2230±5	1042±5	950±5	800±5÷1150±5	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°	75	98

Внутренний диаметр гнезда для установки вставного поручня - 30±1мм.

Внутренний диаметр гнезда для установки стойки для капельницы - 21±1мм.

Внутренний диаметр гнезда для установки стойки для подтягивания - 29±1мм.

Габаритные размеры кровати приведен в приложении 3.

8.23 Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кровати и её компонентов, после падения.

8.24 Длина сетевого кабеля (кабеля электропитания) кровати должна быть 4000±5 мм.

8.25 Длина кабеля пульта управления должна быть 2100±5 мм.

8.26 Подъем кровати и регулирование углов наклона секций осуществляется через электрические линейные приводы. Приводы используются двух видов:

Привод в количестве 2-х штук для регулирования углов наклона кровати имеет следующие характеристики:

- Напряжение двигателя: 24 В пост. тока
- Максимальная потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт
- Максимальная скорость в условиях предельной нагрузки: 7,6 мм/с
- Степень пыле-влагозащиты IP66 по ГОСТ 14254

Привод для подъема кровати имеет следующие характеристики:

- Напряжение двигателя: 24 В пост. тока
- Максимальная потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт
- Максимальная скорость в условиях предельной нагрузки: 23,4 мм/с
- Степень пыле-влагозащиты IP66 по ГОСТ 14254

8.27 Управление механизмами подъема кровати и секций кровати должно осуществляться с помощью пульта управления.

Пульт управления должен иметь следующие кнопки:

- кнопка «вверх»;
- кнопка «вниз»;
- кнопки «наклон спинной секции»;
- кнопки «наклон ножной секции»;
- кнопки одновременного «наклон спинной и ножной секции»;

8.28 Параметры блока управления

8.28.1 Электропитание блока управления осуществляется от сети переменного тока 220±22В, частота 50 Гц.

8.28.2 Выходное напряжение блока управления должно быть 24В.

8.28.3 Максимальная потребляемая мощность блока питания должна быть не более 200 Вт.

8.28.4 Блок управления имеет 4 адаптера для подключения к сети электропитания: EU; US; AU; UK.

8.28.5 К блоку управления может подключаться максимум 3 привода.

8.28.6 Степень пыле-влагозащиты IPX4 по ГОСТ 14254.

8.29 Расстояние между подвижными секциями и рамой ложементов должно быть не менее 10 мм и не более 15 мм. Расстояние между подвижными секциями должно быть не менее 20 мм и не более 50 мм.

8.30 Параметры поручней.

8.30.1 Габаритные размеры поручней приведены в приложении 4.

8.30.2 Масса поручней должна быть:

- поручень вставной не более 3 кг;
- поручень с деревянной вставкой не более 4,5 кг.
- складной поручень не более 3 кг.
- пластмассовый малый поручень не более 2 кг
- пластмассовый большой поручень не более 2,5 кг

8.30.3 Поручень должен выдерживать боковую нагрузку в верхней точке не менее 500 Н.

8.30.4 Установленный поручень должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 500 Н.

8.30.5 Безопасная нагрузка на складной механизм поручня должна быть не более 7 кг.

8.30.6 Безопасная нагрузка на фиксатор поручня должна быть не более 7 кг.

8.31 Параметры стойки для капельницы.

8.31.1 Габаритные размеры стоек для капельницы представлены в приложении 5.

8.31.2 Масса стойки для капельницы должна быть не более 3 кг.

8.31.3 Безопасная нагрузка на крючок должна быть не более 3 кг.

8.31.4 Количество крючков и держателей на стойках для капельниц должно быть:

- стойка для капельницы из нержавеющей стали: 2 складных крючка;
- стойка для капельницы из окрашенной стали: 4 держателя.

8.31.5 На стойках для капельницы из нержавеющей стали складные крючки для емкостей с инфузионными растворами должны закрепляться и регулироваться по высоте от 830 ± 5 мм до 1530 ± 5 мм при помощи винтовых зажимов. После закрепления крючки для инфузионных растворов не должны смещаться от усилия менее 10 даН.

8.31.6 На стойках для капельницы из окрашенной стали держатели для емкостей с инфузионными растворами должны закрепляться и регулироваться по высоте от 930 ± 5 мм до 1510 ± 5 мм при помощи винтовых зажимов. После закрепления крючки для инфузионных растворов не должны смещаться от усилия менее 10 даН.

8.32 Параметры стойки для подтягивания.

8.32.1 Габаритные размеры стойки для подтягивания приведены в приложении 6.

8.32.2 Масса стойки для подтягивания должна быть не более 3 кг.

8.32.3 Максимальная нагрузка на петлю должна быть 150 ± 10 кг.

8.32.4 Механическая прочность стойки для подтягивания должна быть 200 ± 20 кг.

8.32.5 Длина ремня должна регулироваться в интервале от 33 ± 2 до 93 ± 2 см.

8.33 Параметры лестницы для подтягивания.

8.33.1 Габаритные размеры лестницы для подтягивания приведены в приложении 7.

8.33.2 Кол-во перекладин должно быть 4 штуки.

8.33.3 Масса лестницы для подтягивания должна быть не более 1,5 кг.

8.33.4 Максимальная нагрузка на веревку должна быть 200 ± 10 кг.

8.33.5 Максимальная нагрузка на перекладину должна быть 200 ± 10 кг.

8.33.6 Механическая прочность перекладины должна быть 300 ± 20 кг.

8.34 Параметры полки.

8.34.1 Габаритные размеры полки приведены в приложении 8.

8.34.2 Масса полки должна быть не более 3 кг.

8.34.3 Максимальная нагрузка на полку должна быть не более 10 кг.

8.35 Параметры центрального тормоза.

8.35.1 Три (из четырех) колеса с двухпозиционной центральной тормозной системой (С2), которая блокирует колесо и поворотный узел+полная разблокировка.

8.35.2 Одно (из четырех) колес с трехпозиционной центральной тормозной системой (С3), которая блокирует колесо и поворотный узел, либо только поворотный узел, либо полная разблокировка

8.35.3 Управление тормозной системой через кулачковый механизм в стержне фиксации диаметром 28 мм.

8.35.4 Схема центрального тормоза приведена в приложении 9.

8.36 Параметры столика.

8.36.1 Габаритные размеры столика приведены в приложении 10.

8.36.2 Масса столика должна быть не более 4,5 кг.

8.36.3 Стол должен выдерживать полуторакратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 30 ± 1 кг.

8.37 Параметры крючка-держателя

8.37.1 Габаритные размеры крючка-держателя приведены в приложении 11.

8.37.2 Выдерживаемая нагрузка на крючок должна быть не более 10 кг.

8.37.3 Масса крючка-держателя не более 0,05 кг.

8.38 Параметры спиннок

8.38.1 Габаритные размеры спиннок приведены в приложении 13.

8.38.2 Масса спиннок должна быть:

- спинка пластмассовая головная не более 3,5 кг

- спинка пластмассовая ножная не более 3,2 кг

- спинка металлическая не более 4,5 кг

- спинка металлическая с деревянной вставкой не более 5,5 кг.

8.39 Время установления рабочего режима кровати должно быть не более 2 мин.

8.40 Кровать должна обеспечивать продолжительный режим работы не менее 8 часов в сутки.

8.41 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 5000 ч.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Эксплуатация	Температура Влажность (без конденсации)	+10°C....+35° С 30%.....75%
Транспортировка и хранение	Температура Влажность (без конденсации)	-50°C....+50° С 30%.....75%

10 ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-005-27127705-2019 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В гарантию не входят поломки, возникшие по причине неадекватной эксплуатации.

По вопросам гарантийного или текущего ремонта обращаться к: Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

Электрические части кровати должны быть собраны и переданы специальным лицензированным организациям, занимающимся утилизацией электрического и электронного оборудования. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 30324.0-95	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности
ГОСТ 30324.2.38-2012	Изделия медицинские электрические. Часть 2-38. Частные требования безопасности к кроватям медицинским электрическим
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
ГОСТ 14.201-83	Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
ГОСТ 9.032-74	Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.104-79	Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 9.302-88	Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 9.303-84	Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования к выбору.
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ Р 51474-99	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1 общие требования
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности.
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы.
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГОСТ 19120	Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний

13 МАРКИРОВКА

13.1 Маркировка

Каждое изделие маркируется табличкой, выполненным печатным способом, прочно приклеенным к изделию. Маркировка должна содержать:

- наименование изделия по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;
- дату изготовления;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- обозначение ГОСТ 19917.

13.1.1 Маркировка блока управления должна содержать:

- наименование изделия,
- заводской номер,
- год выпуска,
- вид тока,
- напряжение питания и частота питающей сети,
- максимальная потребляемая мощность,
- выходное напряжение и ток,
- символ «Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация»,
- символ «Двойная изоляция»,
- символ «Безусловная стойкость к короткому замыканию»,
- символ «Для использования только внутри помещения»,
- маркировка CE,
- тип рабочей части,
- степень пыле- и влагозащиты.

13.1.2 Маркировка привода должна содержать:

- наименование изделия,
- заводской номер,
- год выпуска,
- вид тока,
- напряжение питания,
- степень пыле- и влагозащиты,
- маркировка CE,
- символ «Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация»,
- символ «Для использования только внутри помещения».

13.2 Применяемые символы

Маркировка блока управления

	Маркировка CE
	Утилизировать надлежащим образом в соответствии с директивой ЕС (2002/96/EG-WEE)
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током.
IPXX	Степень пыле- и влагозащиты
	Тип рабочей части
	Безусловная стойкость к короткому замыканию
	Для использования только внутри помещения

Маркировка привода

	Маркировка CE
	Утилизировать надлежащим образом в соответствии с директивой ЕС (2002/96/EG-WEE)
IPXX	Степень пыле- и влагозащиты
	Для использования только внутри помещения

14 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

15 ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



16 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Таблица 1 – Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия		
Кровать предназначена для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю системы следует обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11-2006	Группа 1	Кровать использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электрошного оборудования
Радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11-2006	Класс Б	Кровать пригодна для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома
Гармонические составляющие тока по ГОСТ 30804.3.2-2013	Класс А	
Колебания напряжения и фликер по ГОСТ 30804.3.3-2013	Соответствует	

Таблица 2 – Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость			
Кровать предназначена для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю кровати следует обеспечить её применение в указанной электромагнитной обстановке			
Испытание на помехоустойчивость	Уровень испытаний	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2 (ГОСТ 30804.4.2-2013)	±6 кВ - контактный разряд	Соответствует	Пол в помещении из дерева, бетона или керамической плитки. При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%
	±8 кВ - воздушный разряд	Соответствует	
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4 (ГОСТ 30804.4.4-2013)	±2 кВ - для линий электропитания	Соответствует	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки
	±1 кВ - для линий ввода/ вывода		
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5 (ГОСТ Р 51317.4.5-99)	±1 кВ при подаче помех по схеме "провод-провод"	Соответствует	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки
	±2 кВ при подаче помехи по схеме "провод-земля"		
Провалы напряжения, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11 (ГОСТ 30804.4.11-2013)	<5% U_n (провал напряжения >95% U_n) в течение 0,5 периода	Соответствует	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки
	40% U_n (провал напряжения 60% U_n) в течение 5 периодов		
	70% U_n (провал напряжения 30% U_n) в течение 25 периодов		
	<5% U_n (провал напряжения >95% U_n) в течение 5 с		
Магнитное поле промышленной частоты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8 (ГОСТ Р 50648-94)	3 А / м	Соответствует	Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больницы обстановки
ПРИМЕЧАНИЕ: U_n – уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.			

Таблица 3 – Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ			
Кровать предназначена для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю кровати следует обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке			
Испытание оборудования на устойчивость	Уровень испытания	Уровень соответствия	Электромагнитная среда - указания
			Портативное и мобильное радиочастотное оборудование, в т.ч. кабели, не должно использоваться рядом с системой ближе, чем на рекомендованном расстоянии, вычисленном по формуле согласно частоте передатчика.
Рекомендованное расстояние			
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99	3В от 150кГц до 80МГц	V1 - 3 (В)	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$
Радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3-2013	3В/м от 80МГц до 2,5ГГц	E1 - 3 (В/м)	$d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ от 80 МГц до 800 МГц
			$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ от 800 МГц до 2,5 ГГц
Где Р – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии со спецификациями производителя, и рекомендованное расстояние в метрах (м). d- рекомендуемый пространственный разнос, м; Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой ^{а)} , должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот ^{б)} Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком:			
			
а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ] превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ] с целью проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение [МЕ ИЗДЕЛИЯ или МЕ СИСТЕМЫ].			
б) За пределами частотного диапазона от 150 кГц до 80 МГц, сила поля не должна превышать (V1) В/м.			

Таблица 4 – Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи, и аппаратом

Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и аппаратом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ			
Кровать предназначена для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь кровати может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и системой, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи			
Максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние в зависимости от частоты передатчика (м)		
	150 кГц ÷ 80 МГц $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 МГц ÷ 800 МГц $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 МГц ÷ 2,5 ГГц $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33
При определении рекомендуемых значений пространственного разнеса d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.			
Примечания 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 3 При определении рекомендуемых значений пространственного разнеса d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика			

Приложение 1

1. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией Rebq4el с принадлежностями по ТУ 32.50.30-005-27127705-2019, варианты исполнения:

1. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4el-LB0000, Rebq4el-LB00B0, Rebq4el-LB00S0, Rebq4el-LB00C00, Rebq4el-LB00CB0, Rebq4el-LB00CS0, Rebq4el-LB00S00, Rebq4el-LB00SB0, Rebq4el-LB00SS0, Rebq4el-LB1000, Rebq4el-LB10B0, Rebq4el-LB10S0, Rebq4el-LB10S00, Rebq4el-LB10SB0, Rebq4el-LB10SS0, Rebq4el-LB10C00, Rebq4el-LB10CB0, Rebq4el-LB10CS0, Rebq4el-LW0000, Rebq4el-LW00B0, Rebq4el-LW00S0, Rebq4el-LW00C00, Rebq4el-LW00CB0, Rebq4el-LW00CS0, Rebq4el-LW00S00, Rebq4el-LW00SB0, Rebq4el-LW00SS0, Rebq4el-LW1000, Rebq4el-LW10B0, Rebq4el-LW10S0, Rebq4el-LW10S00, Rebq4el-LW10SB0, Rebq4el-LW10SS0, Rebq4el-LW10C00, Rebq4el-LW10CB0, Rebq4el-LW10CS0.

2. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4el-NB0000, Rebq4el-NB00B0, Rebq4el-NB00S0, Rebq4el-NB00C00, Rebq4el-NB00CB0, Rebq4el-NB00CS0, Rebq4el-NB00S00, Rebq4el-NB00SB0, Rebq4el-NB00SS0, Rebq4el-NB1000, Rebq4el-NB10B0, Rebq4el-NB10S0, Rebq4el-NB10S00, Rebq4el-NB10SB0, Rebq4el-NB10SS0, Rebq4el-NB10C00, Rebq4el-NB10CB0, Rebq4el-NB10CS0, Rebq4el-NW0000, Rebq4el-NW00B0, Rebq4el-NW00S0, Rebq4el-NW00C00, Rebq4el-NW00CB0, Rebq4el-NW00CS0, Rebq4el-NW00S00, Rebq4el-NW00SB0, Rebq4el-NW00SS0, Rebq4el-NW1000, Rebq4el-NW10B0, Rebq4el-NW10S0, Rebq4el-NW10S00, Rebq4el-NW10SB0, Rebq4el-NW10SS0, Rebq4el-NW10C00, Rebq4el-NW10CB0, Rebq4el-NW10CS0.

3. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4el-PB0000, Rebq4el-PB00B0, Rebq4el-PB00S0, Rebq4el-PB00C00, Rebq4el-PB00CB0, Rebq4el-PB00CS0, Rebq4el-PB00S00, Rebq4el-PB00SB0, Rebq4el-PB00SS0, Rebq4el-PB1000, Rebq4el-PB10B0, Rebq4el-PB10S0, Rebq4el-PB10S00, Rebq4el-PB10SB0, Rebq4el-PB10SS0, Rebq4el-PB10C00, Rebq4el-PB10CB0, Rebq4el-PB10CS0, Rebq4el-PW0000, Rebq4el-PW00B0, Rebq4el-PW00S0, Rebq4el-PW00C00, Rebq4el-PW00CB0, Rebq4el-PW00CS0, Rebq4el-PW00S00, Rebq4el-PW00SB0, Rebq4el-PW00SS0, Rebq4el-PW1000, Rebq4el-PW10B0, Rebq4el-PW10S0, Rebq4el-PW10S00, Rebq4el-PW10SB0, Rebq4el-PW10SS0, Rebq4el-PW10C00, Rebq4el-PW10CB0, Rebq4el-PW10CS0.

4. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4el-HB0000, Rebq4el-HB00B0, Rebq4el-HB00S0, Rebq4el-HB00C00, Rebq4el-HB00CB0, Rebq4el-HB00CS0, Rebq4el-HB00S00, Rebq4el-HB00SB0, Rebq4el-HB00SS0, Rebq4el-HB1000, Rebq4el-HB10B0, Rebq4el-HB10S0, Rebq4el-HB10S00, Rebq4el-HB10SB0, Rebq4el-HB10SS0, Rebq4el-HB10C00, Rebq4el-HB10CB0, Rebq4el-HB10CS0, Rebq4el-HW0000, Rebq4el-HW00B0, Rebq4el-HW00S0, Rebq4el-HW00C00, Rebq4el-HW00CB0, Rebq4el-HW00CS0, Rebq4el-HW00S00, Rebq4el-HW00SB0, Rebq4el-HW00SS0, Rebq4el-HW1000, Rebq4el-HW10B0, Rebq4el-HW10S0, Rebq4el-HW10S00, Rebq4el-HW10SB0, Rebq4el-HW10SS0, Rebq4el-HW10C00, Rebq4el-HW10CB0, Rebq4el-HW10CS0.

5. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4el-LB000L, Rebq4el-LB00BL, Rebq4el-LB00SL, Rebq4el-LB00C0L, Rebq4el-LB00CBL, Rebq4el-LB00CSL, Rebq4el-LB00S0L, Rebq4el-LB00SBL, Rebq4el-LB00SSL, Rebq4el-LB100L, Rebq4el-LB10BL, Rebq4el-LB10SL, Rebq4el-LB10S0L, Rebq4el-LB10SBL, Rebq4el-LB10SSL, Rebq4el-LB10C0L, Rebq4el-LB10CBL, Rebq4el-

LB1CSL, Rebq4cl-LW000L, Rebq4cl-LW00BL, Rebq4cl-LW00SL, Rebq4cl-LW0C0L, Rebq4cl-LW0CBL, Rebq4cl-LW0CSL, Rebq4cl-LW0S0L, Rebq4cl-LW0SBL, Rebq4cl-LW0SSL, Rebq4cl-LW100L, Rebq4cl-LW10BL, Rebq4cl-LW10SL, Rebq4cl-LW1S0L, Rebq4cl-LW1SBL, Rebq4cl-LW1SSL, Rebq4cl-LW1C0L, Rebq4cl-LW1CBL, Rebq4cl-LW1CSL.

6. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4cl-NB000L, Rebq4cl-NB00BL, Rebq4cl-NB00SL, Rebq4cl-NB0C0L, Rebq4cl-NB0CBL, Rebq4cl-NB0CSL, Rebq4cl-NB0S0L, Rebq4cl-NB0SBL, Rebq4cl-NB0SSL, Rebq4cl-NB100L, Rebq4cl-NB10BL, Rebq4cl-NB10SL, Rebq4cl-NB1S0L, Rebq4cl-NB1SBL, Rebq4cl-NB1SSL, Rebq4cl-NB1C0L, Rebq4cl-NB1CBL, Rebq4cl-NB1CSL, Rebq4cl-NW000L, Rebq4cl-NW00BL, Rebq4cl-NW00SL, Rebq4cl-NW0C0L, Rebq4cl-NW0CBL, Rebq4cl-NW0CSL, Rebq4cl-NW0S0L, Rebq4cl-NW0SBL, Rebq4cl-NW0SSL, Rebq4cl-NW100L, Rebq4cl-NW10BL, Rebq4cl-NW10SL, Rebq4cl-NW1S0L, Rebq4cl-NW1SBL, Rebq4cl-NW1SSL, Rebq4cl-NW1C0L, Rebq4cl-NW1CBL, Rebq4cl-NW1CSL.

7. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4cl-PB000L, Rebq4cl-PB00BL, Rebq4cl-PB00SL, Rebq4cl-PB0C0L, Rebq4cl-PB0CBL, Rebq4cl-PB0CSL, Rebq4cl-PB0S0L, Rebq4cl-PB0SBL, Rebq4cl-PB0SSL, Rebq4cl-PB100L, Rebq4cl-PB10BL, Rebq4cl-PB10SL, Rebq4cl-PB1S0L, Rebq4cl-PB1SBL, Rebq4cl-PB1SSL, Rebq4cl-PB1C0L, Rebq4cl-PB1CBL, Rebq4cl-PB1CSL, Rebq4cl-PW000L, Rebq4cl-PW00BL, Rebq4cl-PW00SL, Rebq4cl-PW0C0L, Rebq4cl-PW0CBL, Rebq4cl-PW0CSL, Rebq4cl-PW0S0L, Rebq4cl-PW0SBL, Rebq4cl-PW0SSL, Rebq4cl-PW100L, Rebq4cl-PW10BL, Rebq4cl-PW10SL, Rebq4cl-PW1S0L, Rebq4cl-PW1SBL, Rebq4cl-PW1SSL, Rebq4cl-PW1C0L, Rebq4cl-PW1CBL, Rebq4cl-PW1CSL.

8. Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнения: Rebq4cl-HB000L, Rebq4cl-HB00BL, Rebq4cl-HB00SL, Rebq4cl-HB0C0L, Rebq4cl-HB0CBL, Rebq4cl-HB0CSL, Rebq4cl-HB0S0L, Rebq4cl-HB0SBL, Rebq4cl-HB0SSL, Rebq4cl-HB100L, Rebq4cl-HB10BL, Rebq4cl-HB10SL, Rebq4cl-HB1S0L, Rebq4cl-HB1SBL, Rebq4cl-HB1SSL, Rebq4cl-HB1C0L, Rebq4cl-HB1CBL, Rebq4cl-HB1CSL, Rebq4cl-HW000L, Rebq4cl-HW00BL, Rebq4cl-HW00SL, Rebq4cl-HW0C0L, Rebq4cl-HW0CBL, Rebq4cl-HW0CSL, Rebq4cl-HW0S0L, Rebq4cl-HW0SBL, Rebq4cl-HW0SSL, Rebq4cl-HW100L, Rebq4cl-HW10BL, Rebq4cl-HW10SL, Rebq4cl-HW1S0L, Rebq4cl-HW1SBL, Rebq4cl-HW1SSL, Rebq4cl-HW1C0L, Rebq4cl-HW1CBL, Rebq4cl-HW1CSL.

II. Принадлежности:

1. Полка;
2. Центральный тормоз;
3. Столик пластиковый;
4. Столик деревянный;
5. Крючок-держатель.

Приложение 2
Комплект поставки

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт
1	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией Rebq4el с принадлежностями по ТУ 32.50.30-005-27127705-2019, варианты исполнения:	
1.	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0000, в составе:	
1.1	Подпятник	4
1.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
2.	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00B0, в составе:	
2.1	Подпятник	4
2.2	Устройство для подтягивания	1
2.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
3.	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00S0, в составе:	
3.1	Подпятник	4
3.2	Лестница для подтягивания	1
3.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
4	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00C00, в составе:	
4.1	Подпятник	4
4.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
4.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
5	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00CB0, в составе:	
5.1	Подпятник	4
5.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
5.3	Устройство для подтягивания	1
5.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
6	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00CS0, в составе:	
6.1	Подпятник	4
6.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
6.3	Лестница для подтягивания	1
6.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
7	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00S00, в составе:	
7.1	Подпятник	4
7.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
7.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
8	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB0SB0, в составе:	
8.1	Подпятник	4
8.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
8.3	Устройство для подтягивания	1
8.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
9	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB0SS0, в составе:	
9.1	Подпятник	4
9.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
9.3	Лестница для подтягивания	1
9.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
10	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB1000, в составе:	
10.1	Подпятник	4
10.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
10.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
11	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB10B0, в составе:	
11.1	Подпятник	4
11.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
11.3	Устройство для подтягивания	1
11.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
12	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB10S0, в составе:	
12.1	Подпятник	4
12.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
12.3	Лестница для подтягивания	1
12.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
13	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB1S00, в составе:	
13.1	Подпятник	4
13.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
13.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
13.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
14	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4cl-LB1SB0, в составе:	
14.1	Подпятник	4
14.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
14.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
14.4	Устройство для подтягивания	1

14.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
15	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1SS0, в составе:	
15.1	Подпятник	4
15.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
15.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
15.4	Лестница для подтягивания	1
15.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
16	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1C00, в составе:	
16.1	Подпятник	4
16.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
16.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
16.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
17	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1CB0, в составе:	
17.1	Подпятник	4
17.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
17.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
17.4	Устройство для подтягивания	1
17.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
18	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1CS0, в составе:	
18.1	Подпятник	4
18.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
18.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
18.4	Лестница для подтягивания	1
18.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
19	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0000, в составе:	
19.1	Колеса	4
19.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
20	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW00B0, в составе:	
20.1	Колеса	4
20.2	Устройство для подтягивания	1
20.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
21	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW00S0, в составе:	
21.1	Колеса	4

21.2	Лестница для подтягивания	1
21.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
22	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0C00, в составе:	
22.1	Колеса	4
22.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
22.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
23	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0CB0, в составе:	
23.1	Колеса	4
23.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
23.3	Устройство для подтягивания	1
23.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
24	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0CS0, в составе:	
24.1	Колеса	4
24.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
24.3	Лестница для подтягивания	1
24.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
25	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0S00, в составе:	
25.1	Колеса	4
25.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
25.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
26	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0SB0, в составе:	
26.1	Колеса	4
26.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
26.3	Устройство для подтягивания	1
26.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
27	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0SS0, в составе:	
27.1	Колеса	4
27.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
27.3	Лестница для подтягивания	1
27.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
28	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1000, в составе:	
28.1	Колеса	4
28.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
28.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
29	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW10B0, в составе:	
29.1	Колеса	4
29.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
29.3	Устройство для подтягивания	1
29.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
30	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW10S0, в составе:	
30.1	Колеса	4
30.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
30.3	Лестница для подтягивания	1
30.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
31	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1S00, в составе:	
31.1	Колеса	4
31.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
31.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
31.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
32	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1SB0, в составе:	
32.1	Колеса	4
32.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
32.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
32.4	Устройство для подтягивания	1
32.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
33	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1SS0, в составе:	
33.1	Колеса	4
33.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
33.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
33.4	Лестница для подтягивания	1
33.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
34	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1CB0, в составе:	
34.1	Колеса	4
34.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
34.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
34.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
35	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1CB0, в составе:	

35.1	Колеса	4
35.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
35.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
35.4	Устройство для подтягивания	1
35.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
36	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1CS0, в составе:	
36.1	Колеса	4
36.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
36.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
36.4	Лестница для подтягивания	1
36.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
37	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0000, в составе:	
37.1	Подпятник	4
37.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
38	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB00B0, в составе:	
38.1	Подпятник	4
38.2	Устройство для подтягивания	1
38.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
39	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB00S0, в составе:	
39.1	Подпятник	4
39.2	Лестница для подтягивания	1
39.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
40	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0C00, в составе:	
40.1	Подпятник	4
40.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
40.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
41	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0CB0, в составе:	
41.1	Подпятник	4
41.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
41.3	Устройство для подтягивания	1
41.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
42	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0CS0, в составе:	
42.1	Подпятник	4
42.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
42.3	Лестница для подтягивания	1

42.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
43	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB0S00, в составе:	
43.1	Подпятник	4
43.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
43.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
44	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB0SB0, в составе:	
44.1	Подпятник	4
44.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
44.3	Устройство для подтягивания	1
44.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
45	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB0SS0, в составе:	
45.1	Подпятник	4
45.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
45.3	Лестница для подтягивания	1
45.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
46	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1000, в составе:	
46.1	Подпятник	4
46.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
46.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
47	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB10B0, в составе:	
47.1	Подпятник	4
47.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
47.3	Устройство для подтягивания	1
47.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
48	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB10S0, в составе:	
48.1	Подпятник	4
48.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
48.3	Лестница для подтягивания	1
48.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
49	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1S00, в составе:	
49.1	Подпятник	4
49.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
49.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1

49.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
50	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1SB0, в составе:	
50.1	Подпятник	4
50.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
50.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
50.4	Устройство для подтягивания	1
50.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
51	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1SS0, в составе:	
51.1	Подпятник	4
51.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
51.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
51.4	Лестница для подтягивания	1
51.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
52	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1C00, в составе:	
52.1	Подпятник	4
52.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
52.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
52.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
53	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1CB0, в составе:	
53.1	Подпятник	4
53.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
53.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
53.4	Устройство для подтягивания	1
53.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
54	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NB1CS0, в составе:	
54.1	Подпятник	4
54.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
54.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
54.4	Лестница для подтягивания	1
54.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
55	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NW0000, в составе:	
55.1	Колеса	4
55.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
56	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW00B0, в составе:	
56.1	Колеса	4
56.2	Устройство для подтягивания	1
56.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
57	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW00S0, в составе:	
57.1	Колеса	4
57.2	Лестница для подтягивания	1
57.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
58	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0C00, в составе:	
58.1	Колеса	4
58.2	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
58.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
59	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0CB0, в составе:	
59.1	Колеса	4
59.2	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
59.3	Устройство для подтягивания	1
59.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
60	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0CS0, в составе:	
60.1	Колеса	4
60.2	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
60.3	Лестница для подтягивания	1
60.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
61	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0S00, в составе:	
61.1	Колеса	4
61.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
61.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
62	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0SB0, в составе:	
62.1	Колеса	4
62.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
62.3	Устройство для подтягивания	1
62.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
63	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0SS0, в составе:	
63.1	Колеса	4
63.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
63.3	Лестница для подтягивания	1
63.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
64	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1000, в составе:	
64.1	Колеса	4
64.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
64.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
65	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW10B0, в составе:	
65.1	Колеса	4
65.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
65.3	Устройство для подтягивания	1
65.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
66	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW10S0, в составе:	
66.1	Колеса	4
66.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
66.3	Лестница для подтягивания	1
66.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
67	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1S00, в составе:	
67.1	Колеса	4
67.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
67.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
67.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
68	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1SB0, в составе:	
68.1	Колеса	4
68.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
68.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
68.4	Устройство для подтягивания	1
68.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
69	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1SS0, в составе:	
69.1	Колеса	4
69.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
69.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
69.4	Лестница для подтягивания	1
69.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
70	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из	

	стальной сетки Rebq4el-NW1C00, в составе:	
70.1	Колеса	4
70.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
70.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
70.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
71	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1CB0, в составе:	
71.1	Колеса	4
71.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
71.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
71.4	Устройство для подтягивания	1
71.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
72	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1CS0, в составе:	
72.1	Колеса	4
72.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
72.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
72.4	Лестница для подтягивания	1
72.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
73	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PB0000, в составе:	
73.1	Подпятник	4
73.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
74	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PB00B0, в составе:	
74.1	Подпятник	4
74.2	Устройство для подтягивания	1
74.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
75	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PB00S0, в составе:	
75.1	Подпятник	4
75.2	Лестница для подтягивания	1
75.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
76	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PB0C00, в составе:	
76.1	Подпятник	4
76.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
76.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
77	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PB0CB0, в составе:	
77.1	Подпятник	4

77.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
77.3	Устройство для подтягивания	1
77.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
78	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB0CS0, в составе:	
78.1	Подпятник	4
78.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
78.3	Лестница для подтягивания	1
78.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
79	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB0S00, в составе:	
79.1	Подпятник	4
79.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
79.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
80	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB0SB0, в составе:	
80.1	Подпятник	4
80.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
80.3	Устройство для подтягивания	1
80.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
81	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB0SS0, в составе:	
81.1	Подпятник	4
81.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
81.3	Лестница для подтягивания	1
81.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
82	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1000, в составе:	
82.1	Подпятник	4
82.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
82.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
83	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB10B0, в составе:	
83.1	Подпятник	4
83.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
83.3	Устройство для подтягивания	1
83.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
84	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB10S0, в составе:	
84.1	Подпятник	4
84.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

84.3	Лестница для подтягивания	1
84.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
85	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1S00, в составе:	
85.1	Подпятник	4
85.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
85.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
85.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
86	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1SB0, в составе:	
86.1	Подпятник	4
86.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
86.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
86.4	Устройство для подтягивания	1
86.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
87	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1SS0, в составе:	
87.1	Подпятник	4
87.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
87.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
87.4	Лестница для подтягивания	1
87.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
88	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1C00, в составе:	
88.1	Подпятник	4
88.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
88.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
88.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
89	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1CB0, в составе:	
89.1	Подпятник	4
89.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
89.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
89.4	Устройство для подтягивания	1
89.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
90	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebg4el-PB1CS0, в составе:	
90.1	Подпятник	4
90.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
90.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1

90.4	Лестница для подтягивания	1
90.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
91	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0000, в составе:	
91.1	Колеса	4
91.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
92	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW00B0, в составе:	
92.1	Колеса	4
92.2	Устройство для подтягивания	1
92.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
93	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW00S0, в составе:	
93.1	Колеса	4
93.2	Лестница для подтягивания	1
93.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
94	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0C00, в составе:	
94.1	Колеса	4
94.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
94.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
95	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0CB0, в составе:	
95.1	Колеса	4
95.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
95.3	Устройство для подтягивания	1
95.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
96	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0CS0, в составе:	
96.1	Колеса	4
96.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
96.3	Лестница для подтягивания	1
96.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
97	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0S00, в составе:	
97.1	Колеса	4
97.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
97.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
98	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0SB0, в составе:	
98.1	Колеса	4
98.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1

98.3	Устройство для подтягивания	1
98.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
99	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW0SS0, в составе:	
99.1	Колеса	4
99.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
99.3	Лестница для подтягивания	1
99.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
100	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW1000, в составе:	
100.1	Колеса	4
100.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
100.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
101	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW10B0, в составе:	
101.1	Колеса	4
101.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
101.3	Устройство для подтягивания	1
101.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
102	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW10S0, в составе:	
102.1	Колеса	4
102.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
102.3	Лестница для подтягивания	1
102.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
103	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW1S00, в составе:	
103.1	Колеса	4
103.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
103.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
103.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
104	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PW1SB0, в составе:	
104.1	Колеса	4
104.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
104.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
104.4	Устройство для подтягивания	1
104.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
105	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из	

	пластика Rebq4el-PWISS0, в составе:	
105.1	Колеса	4
105.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
105.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
105.4	Лестница для подтягивания	1
105.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
106	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PWIC00, в составе:	
106.1	Колеса	4
106.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
106.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
106.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
107	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PWICB0, в составе:	
107.1	Колеса	4
107.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
107.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
107.4	Устройство для подтягивания	1
107.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
108	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из пластика Rebq4el-PWICS0, в составе:	
108.1	Колеса	4
108.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
108.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
108.4	Лестница для подтягивания	1
108.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
109	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0000, в составе:	
109.1	Подпятник	4
109.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
110	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB00B0, в составе:	
110.1	Подпятник	4
110.2	Устройство для подтягивания	1
110.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
111	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB00S0, в составе:	
111.1	Подпятник	4
111.2	Лестница для подтягивания	1
111.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
112	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0C00, в составе:	
112.1	Подпятник	4
112.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
112.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
113	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0CB0, в составе:	
113.1	Подпятник	4
113.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
113.3	Устройство для подтягивания	1
113.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
114	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0CS0, в составе:	
114.1	Подпятник	4
114.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
114.3	Лестница для подтягивания	1
114.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
115	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0S00, в составе:	
115.1	Подпятник	4
115.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
115.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
116	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0SB0, в составе:	
116.1	Подпятник	4
116.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
116.3	Устройство для подтягивания	1
116.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
117	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0SS0, в составе:	
117.1	Подпятник	4
117.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
117.3	Лестница для подтягивания	1
117.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
118	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB1000, в составе:	
118.1	Подпятник	4
118.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
118.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
119	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB10B0, в составе:	
119.1	Подпятник	4
119.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень	2

	или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	
119.3	Устройство для подтягивания	1
119.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
120	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4el-HB10S0, в составе:	
120.1	Подпятник	4
120.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
120.3	Лестница для подтягивания	1
120.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
121	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4el-HB1S00, в составе:	
121.1	Подпятник	4
121.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
121.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
121.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
122	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4el-HB1SB0, в составе:	
122.1	Подпятник	4
122.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
122.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
122.4	Устройство для подтягивания	1
122.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
123	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4el-HB1SS0, в составе:	
123.1	Подпятник	4
123.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
123.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
123.4	Лестница для подтягивания	1
123.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
124	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4el-HB1CB0, в составе:	
124.1	Подпятник	4
124.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
124.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
124.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
125	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4el-HB1CB0, в составе:	
125.1	Подпятник	4
125.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
125.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1

125.4	Устройство для подтягивания	1
125.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
126	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1CS0, в составе:	
126.1	Подпятник	4
126.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
126.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
126.4	Лестница для подтягивания	1
126.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
127	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW0000, в составе:	
127.1	Колеса	4
127.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
128	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW00B0, в составе:	
128.1	Колеса	4
128.2	Устройство для подтягивания	1
128.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
129	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW00S0, в составе:	
129.1	Колеса	4
129.2	Лестница для подтягивания	1
129.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
130	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW0C00, в составе:	
130.1	Колеса	4
130.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
130.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
131	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW0CB0, в составе:	
131.1	Колеса	4
131.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
131.3	Устройство для подтягивания	1
131.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
132	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW0CS0, в составе:	
132.1	Колеса	4
132.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
132.3	Лестница для подтягивания	1
132.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
133	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из	

	перфорированного стального листа Rebq4el-HW0S00, в составе:	
133.1	Колеса	4
133.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
133.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
134	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0SB0, в составе:	
134.1	Колеса	4
134.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
134.3	Устройство для подтягивания	1
134.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
135	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0SS0, в составе:	
135.1	Колеса	4
135.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
135.3	Лестница для подтягивания	1
135.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
136	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW1000, в составе:	
136.1	Колеса	4
136.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
136.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
137	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW10B0, в составе:	
137.1	Колеса	4
137.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
137.3	Устройство для подтягивания	1
137.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
138	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW10S0, в составе:	
138.1	Колеса	4
138.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
138.3	Лестница для подтягивания	1
138.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
139	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW1S00, в составе:	
139.1	Колеса	4
139.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
139.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
139.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
140	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из	

	перфорированного стального листа Rcbq4cl-HW1SB0, в составе:	
140.1	Колеса	4
140.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
140.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
140.4	Устройство для подтягивания	1
140.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
141	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4cl-HW1SS0, в составе:	
141.1	Колеса	4
141.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
141.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
141.4	Лестница для подтягивания	1
141.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
142	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4cl-HW1C00, в составе:	
142.1	Колеса	4
142.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
142.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
142.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
143	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4cl-HW1CB0, в составе:	
143.1	Колеса	4
143.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
143.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
143.4	Устройство для подтягивания	1
143.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
144	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из перфорированного стального листа Rcbq4cl-HW1CS0, в составе:	
144.1	Колеса	4
144.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
144.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
144.4	Лестница для подтягивания	1
144.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
145	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4cl-LB000L, в составе:	
145.1	Подпятник	4
145.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
146	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4cl-LB00BL, в составе:	
146.1	Подпятник	4
146.2	Устройство для подтягивания	1

146.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
147	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB00SL, в составе:	
147.1	Подпятник	4
147.2	Лестница для подтягивания	1
147.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
148	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0C0L, в составе:	
148.1	Подпятник	4
148.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
148.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
149	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0CBL, в составе:	
149.1	Подпятник	4
149.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
149.3	Устройство для подтягивания	1
149.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
150	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0CSL, в составе:	
150.1	Подпятник	4
150.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
150.3	Лестница для подтягивания	1
150.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
151	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0S0L, в составе:	
151.1	Подпятник	4
151.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
151.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
152	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0SBL, в составе:	
152.1	Подпятник	4
152.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
152.3	Устройство для подтягивания	1
152.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
153	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB0SSL, в составе:	
153.1	Подпятник	4
153.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
153.3	Лестница для подтягивания	1
153.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
154	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB100L, в составе:	

154.1	Подпятник	4
154.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
154.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	1
155	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB10BL, в составе:	
155.1	Подпятник	4
155.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
155.3	Устройство для подтягивания	1
155.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
156	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB10SL, в составе:	
156.1	Подпятник	4
156.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
156.3	Лестница для подтягивания	1
156.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
157	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1S0L, в составе:	
157.1	Подпятник	4
157.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
157.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
157.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
158	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1SBL, в составе:	
158.1	Подпятник	4
158.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
158.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
158.4	Устройство для подтягивания	1
158.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
159	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1SSL, в составе:	
159.1	Подпятник	4
159.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
159.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
159.4	Лестница для подтягивания	1
159.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
160	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LB1C0L, в составе:	
160.1	Подпятник	4
160.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

160.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
160.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
161	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LB1CBL, в составе:	
161.1	Подпятник	4
161.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
161.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
161.4	Устройство для подтягивания	1
161.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
162	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LB1CSL, в составе:	
162.1	Подпятник	4
162.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
162.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
162.4	Лестница для подтягивания	1
162.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
163	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LW000L, в составе:	
163.1	Колеса	4
163.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
164	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LW00BL, в составе:	
164.1	Колеса	4
164.2	Устройство для подтягивания	1
164.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
165	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LW00SL, в составе:	
165.1	Колеса	4
165.2	Лестница для подтягивания	1
165.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
166	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LW0C0L, в составе:	
166.1	Колеса	4
166.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
166.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
167	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rcbq4el-LW0CBL, в составе:	
167.1	Колеса	4
167.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
167.3	Устройство для подтягивания	1
167.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

168	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0CSL, в составе:	
168.1	Колеса	4
168.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
168.3	Лестница для подтягивания	1
168.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
169	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0S0L, в составе:	
169.1	Колеса	4
169.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
169.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
170	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0SBL, в составе:	
170.1	Колеса	4
170.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
170.3	Устройство для подтягивания	1
170.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
171	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW0SSL, в составе:	
171.1	Колеса	4
171.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
171.3	Лестница для подтягивания	1
171.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
172	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW100L, в составе:	
172.1	Колеса	4
172.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
172.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
173	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW10BL, в составе:	
173.1	Колеса	4
173.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
173.3	Устройство для подтягивания	1
173.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
174	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW10SL, в составе:	
174.1	Колеса	4
174.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
174.3	Лестница для подтягивания	1
174.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
175	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebg4el-LWISOL, в составе:	
175.1	Колеса	4
175.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
175.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
175.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
176	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebg4el-LWISBL, в составе:	
176.1	Колеса	4
176.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
176.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
176.4	Устройство для подтягивания	1
176.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
177	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebg4el-LWISBL, в составе:	
177.1	Колеса	4
177.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
177.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
177.4	Лестница для подтягивания	1
177.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
178	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebg4el-LWICOL, в составе:	
178.1	Колеса	4
178.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
178.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
178.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
179	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebg4el-LWICBL, в составе:	
179.1	Колеса	4
179.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
179.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
179.4	Устройство для подтягивания	1
179.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
180	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebg4el-LWICSL, в составе:	
180.1	Колеса	4
180.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
180.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
180.4	Лестница для подтягивания	1
180.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
181	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB000L, в составе:	
181.1	Подпятник	4
181.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
182	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB00BL, в составе:	
182.1	Подпятник	4
182.2	Устройство для подтягивания	1
182.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
183	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB00SL, в составе:	
183.1	Подпятник	4
183.2	Лестница для подтягивания	1
183.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
184	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0C0L, в составе:	
184.1	Подпятник	4
184.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
184.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
185	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0CBL, в составе:	
185.1	Подпятник	4
185.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
185.3	Устройство для подтягивания	1
185.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
186	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0CSL, в составе:	
186.1	Подпятник	4
186.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
186.3	Лестница для подтягивания	1
186.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
187	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0S0L, в составе:	
187.1	Подпятник	4
187.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
187.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
188	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NB0SBL, в составе:	
188.1	Подпятник	4
188.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
188.3	Устройство для подтягивания	1
188.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
189	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB0SSL, в составе:	
189.1	Подпятник	4
189.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
189.3	Лестница для подтягивания	1
189.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
190	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB100L, в составе:	
190.1	Подпятник	4
190.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
190.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
191	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB10BL, в составе:	
191.1	Подпятник	4
191.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
191.3	Устройство для подтягивания	1
191.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
192	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB10SL, в составе:	
192.1	Подпятник	4
192.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
192.3	Лестница для подтягивания	1
192.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	1
193	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB1S0L, в составе:	
193.1	Подпятник	4
193.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
193.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
193.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
194	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB1SBL, в составе:	
194.1	Подпятник	4
194.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
194.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
194.4	Устройство для подтягивания	1
194.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
195	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икронежной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4cl-NB1SSL, в составе:	
195.1	Подпятник	4
195.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

195.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
195.4	Лестница для подтягивания	1
195.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
196	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NB1C0L, в составе:	
196.1	Подпятник	4
196.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
196.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
196.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
197	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NB1CBL, в составе:	
197.1	Подпятник	4
197.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
197.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
197.4	Устройство для подтягивания	1
197.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
198	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NB1CSL, в составе:	
198.1	Подпятник	4
198.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
198.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
198.4	Лестница для подтягивания	1
198.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
199	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NW000L, в составе:	
199.1	Колеса	4
199.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
200	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NW00BL, в составе:	
200.1	Колеса	4
200.2	Устройство для подтягивания	1
200.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
201	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NW00SL, в составе:	
201.1	Колеса	4
201.2	Лестница для подтягивания	1
201.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
202	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4cl-NW0C0L, в составе:	
202.1	Колеса	4
202.2	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1

202.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
203	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0CBL, в составе:	
203.1	Колеса	4
203.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
203.3	Устройство для подтягивания	1
203.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
204	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0CSL, в составе:	
204.1	Колеса	4
204.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
204.3	Лестница для подтягивания	1
204.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
205	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0S0L, в составе:	
205.1	Колеса	4
205.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
205.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
206	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0SBL, в составе:	
206.1	Колеса	4
206.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
206.3	Устройство для подтягивания	1
206.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
207	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW0SSL, в составе:	
207.1	Колеса	4
207.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
207.3	Лестница для подтягивания	1
207.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
208	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW100L, в составе:	
208.1	Колеса	4
208.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
208.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
209	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW10BL, в составе:	
209.1	Колеса	4
209.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
209.3	Устройство для подтягивания	1
209.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

210	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW10SL, в составе:	
210.1	Колеса	4
210.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
210.3	Лестница для подтягивания	1
210.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
211	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW10SL, в составе:	
211.1	Колеса	4
211.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
211.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
211.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
212	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1SBL, в составе:	
212.1	Колеса	4
212.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
212.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
212.4	Устройство для подтягивания	1
212.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
213	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1SSL, в составе:	
213.1	Колеса	4
213.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
213.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
213.4	Лестница для подтягивания	1
213.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
214	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1C0L, в составе:	
214.1	Колеса	4
214.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
214.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
214.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
215	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq4el-NW1CBL, в составе:	
215.1	Колеса	4
215.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
215.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
215.4	Устройство для подтягивания	1
215.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
216	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg4el-NW1CSL, в составе:	
216.1	Колеса	4
216.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
216.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
216.4	Лестница для подтягивания	1
216.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
217	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB000L, в составе:	
217.1	Подпятник	4
217.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
218	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB00BL, в составе:	
218.1	Подпятник	4
218.2	Устройство для подтягивания	1
218.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
219	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB00SL, в составе:	
219.1	Подпятник	4
219.2	Лестница для подтягивания	1
219.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
220	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB0C0L, в составе:	
220.1	Подпятник	4
220.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
220.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
221	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB0CBL, в составе:	
221.1	Подпятник	4
221.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
221.3	Устройство для подтягивания	1
221.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
222	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB0CSL, в составе:	
222.1	Подпятник	4
222.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
222.3	Лестница для подтягивания	1
222.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
223	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PB0S0L, в составе:	
223.1	Подпятник	4
223.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
223.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
224	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB0SBL, в составе:	
224.1	Подпятник	4
224.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
224.3	Устройство для подтягивания	1
224.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
225	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB0SSL, в составе:	
225.1	Подпятник	4
225.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
225.3	Лестница для подтягивания	1
225.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
226	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB100L, в составе:	
226.1	Подпятник	4
226.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
226.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
227	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB10BL, в составе:	
227.1	Подпятник	4
227.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
227.3	Устройство для подтягивания	1
227.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
228	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB10SL, в составе:	
228.1	Подпятник	4
228.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
228.3	Лестница для подтягивания	1
228.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
229	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB1S0L, в составе:	
229.1	Подпятник	4
229.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
229.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
229.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
230	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB1SBL, в составе:	
230.1	Подпятник	4
230.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

230.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
230.4	Устройство для подтягивания	1
230.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
231	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB1SSL, в составе:	
231.1	Подпятник	4
231.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
231.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
231.4	Лестница для подтягивания	1
231.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
232	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB1COL, в составе:	
232.1	Подпятник	4
232.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
232.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
232.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
233	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB1CBL, в составе:	
233.1	Подпятник	4
233.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
233.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
233.4	Устройство для подтягивания	1
233.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
234	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PB1CSL, в составе:	
234.1	Подпятник	4
234.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
234.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
234.4	Лестница для подтягивания	1
234.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
235	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW000L, в составе:	
235.1	Колеса	4
235.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
236	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW00BL, в составе:	
236.1	Колеса	4
236.2	Устройство для подтягивания	1
236.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
237	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с	

	ложементом из пластика Rebg4el-PW00SL, в составе:	
237.1	Колеса	4
237.2	Лестница для подтягивания	1
237.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
238	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW0C0L, в составе:	
238.1	Колеса	4
238.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
238.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
239	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW0CB1, в составе:	
239.1	Колеса	4
239.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
239.3	Устройство для подтягивания	1
239.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
240	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW0CSL, в составе:	
240.1	Колеса	4
240.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
240.3	Лестница для подтягивания	1
240.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
241	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW0S0L, в составе:	
241.1	Колеса	4
241.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
241.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
242	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW0SBL, в составе:	
242.1	Колеса	4
242.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
242.3	Устройство для подтягивания	1
242.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
243	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW0SSL, в составе:	
243.1	Колеса	4
243.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
243.3	Лестница для подтягивания	1
243.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
244	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebg4el-PW100L, в составе:	
244.1	Колеса	4
244.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
244.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
245	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW10BL, в составе:	
245.1	Колеса	4
245.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
245.3	Устройство для подтягивания	1
245.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
246	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW10SL, в составе:	
246.1	Колеса	4
246.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
246.3	Лестница для подтягивания	1
246.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
247	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW10SL, в составе:	
247.1	Колеса	4
247.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
247.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
247.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
248	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW1SBL, в составе:	
248.1	Колеса	4
248.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
248.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
248.4	Устройство для подтягивания	1
248.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
249	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW1SSL, в составе:	
249.1	Колеса	4
249.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
249.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
249.4	Лестница для подтягивания	1
249.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
250	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW1C0L, в составе:	
250.1	Колеса	4
250.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
250.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
250.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
251	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной,	

	икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW1CBL, в составе:	
251.1	Колеса	4
251.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
251.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
251.4	Устройство для подтягивания	1
251.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
252	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из пластика Rebq4el-PW1CSI, в составе:	
252.1	Колеса	4
252.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
252.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
252.4	Лестница для подтягивания	1
252.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
253	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB000L, в составе:	
253.1	Подпятник	4
253.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
254	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB00BL, в составе:	
254.1	Подпятник	4
254.2	Устройство для подтягивания	1
254.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
255	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB00SL, в составе:	
255.1	Подпятник	4
255.2	Лестница для подтягивания	1
255.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
256	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0C0L, в составе:	
256.1	Подпятник	4
256.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
256.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
257	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0CBL, в составе:	
257.1	Подпятник	4
257.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
257.3	Устройство для подтягивания	1
257.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
258	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HB0CSL, в составе:	
258.1	Подпятник	4

258.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
258.3	Лестница для подтягивания	1
258.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
259	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB0S0L, в составе:	
259.1	Подпятник	4
259.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали со складными крючками или не складными крючками	1
259.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
260	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB0SBL, в составе:	
260.1	Подпятник	4
260.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
260.3	Устройство для подтягивания	1
260.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
261	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB0SSL, в составе:	
261.1	Подпятник	4
261.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
261.3	Лестница для подтягивания	1
261.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
262	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB100L, в составе:	
262.1	Подпятник	4
262.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
262.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
263	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB10BL, в составе:	
263.1	Подпятник	4
263.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
263.3	Устройство для подтягивания	1
263.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
264	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB10SL, в составе:	
264.1	Подпятник	4
264.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
264.3	Лестница для подтягивания	1
264.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
265	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1S0L, в составе:	
265.1	Подпятник	4

265.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
265.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
265.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
266	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1SBI, в составе:	
266.1	Подпятник	4
266.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
266.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
266.4	Устройство для подтягивания	1
266.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
267	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1SSL, в составе:	
267.1	Подпятник	4
267.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
267.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
267.4	Лестница для подтягивания	1
267.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
268	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1C0L, в составе:	
268.1	Подпятник	4
268.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
268.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
268.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
269	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1CBL, в составе:	
269.1	Подпятник	4
269.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
269.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
269.4	Устройство для подтягивания	1
269.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
270	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HB1CSL, в составе:	
270.1	Подпятник	4
270.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
270.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
270.4	Лестница для подтягивания	1
270.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
271	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebg4el-HW000L, в составе:	
271.1	Колеса	4

271.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
272	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW00BL, в составе:	
272.1	Колеса	4
272.2	Устройство для подтягивания	1
272.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
273	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW00SL, в составе:	
273.1	Колеса	4
273.2	Лестница для подтягивания	1
273.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
274	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0C0L, в составе:	
274.1	Колеса	4
274.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
274.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
275	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0CBL, в составе:	
275.1	Колеса	4
275.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
275.3	Устройство для подтягивания	1
275.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
276	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0CSL, в составе:	
276.1	Колеса	4
276.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
276.3	Лестница для подтягивания	1
276.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
277	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0S0L, в составе:	
277.1	Колеса	4
277.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
277.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
278	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0SBL, в составе:	
278.1	Колеса	4
278.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
278.3	Устройство для подтягивания	1
278.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
279	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW0SSL, в составе:	



279.1	Колеса	4
279.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
279.3	Лестница для подтягивания	1
279.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
280	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW100L, в составе:	
280.1	Колеса	4
280.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
280.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
281	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW10BL, в составе:	
281.1	Колеса	4
281.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
281.3	Устройство для подтягивания	1
281.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
282	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW10SL, в составе:	
282.1	Колеса	4
282.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
282.3	Лестница для подтягивания	1
282.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
283	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW1S0L, в составе:	
283.1	Колеса	4
283.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
283.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
283.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
284	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW1SBL, в составе:	
284.1	Колеса	4
284.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
284.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
284.4	Устройство для подтягивания	1
284.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
285	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4el-HW1SSL, в составе:	
285.1	Колеса	4
285.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
285.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
285.4	Лестница для подтягивания	1

285.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
286	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4cl-HW1C0L, в составе:	
286.1	Колеса	4
286.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
286.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
286.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
287	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4cl-HW1CBL, в составе:	
287.1	Колеса	4
287.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
287.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
287.4	Устройство для подтягивания	1
287.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
288	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq4cl-HW1CSL, в составе:	
288.1	Колеса	4
288.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
288.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
288.4	Лестница для подтягивания	1
288.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
	Подпятник	4
II	Принадлежности:	-
1.	Полка	1
2.	Центральный тормоз	1
3.	Столик пластиковый	1
4.	Столик деревянный	1
5.	Крючок-держатель	1
III	Руководство по эксплуатации и паспорт	1

* - Спинка пластмассовая в составе: спинка пластмассовая головная – 1 шт., спинка пластмассовая ножная – 1 шт.



Приложение 3 Габаритные размеры

Кровать без подъема

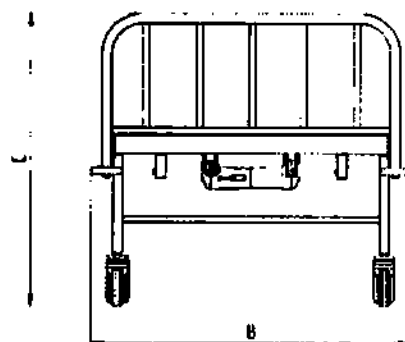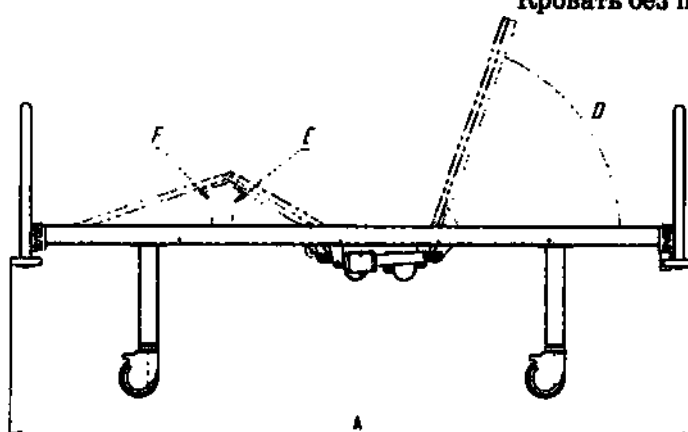


A	B	C	D	E	F
2230±5 мм	1042±5 мм	950±5 мм	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°

Кровать с подъемом

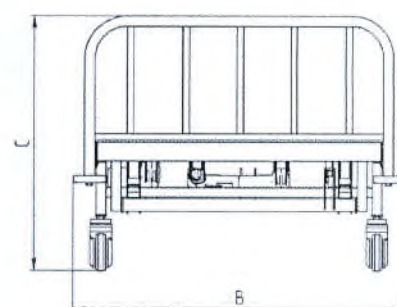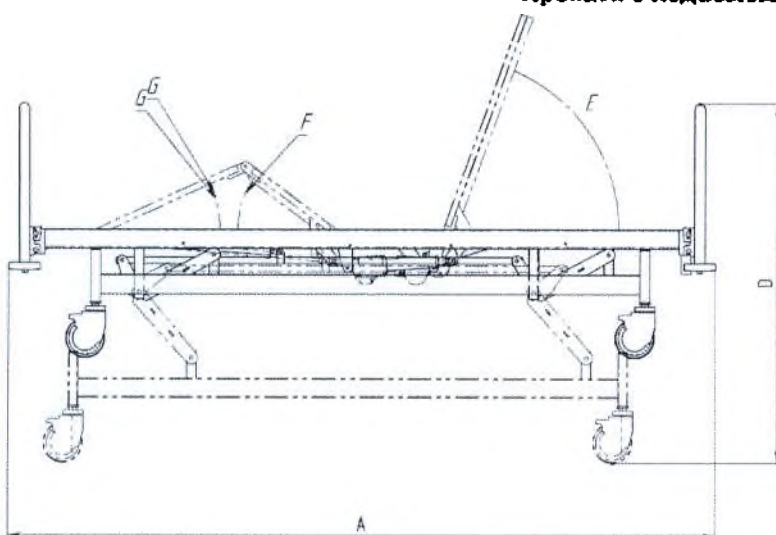


A	B	C	D	E	E	F
2230±5 мм	1042±5 мм	800±5 мм	1150±5 мм	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°

Приложение 4
Габаритные размеры
 Поручень вставной

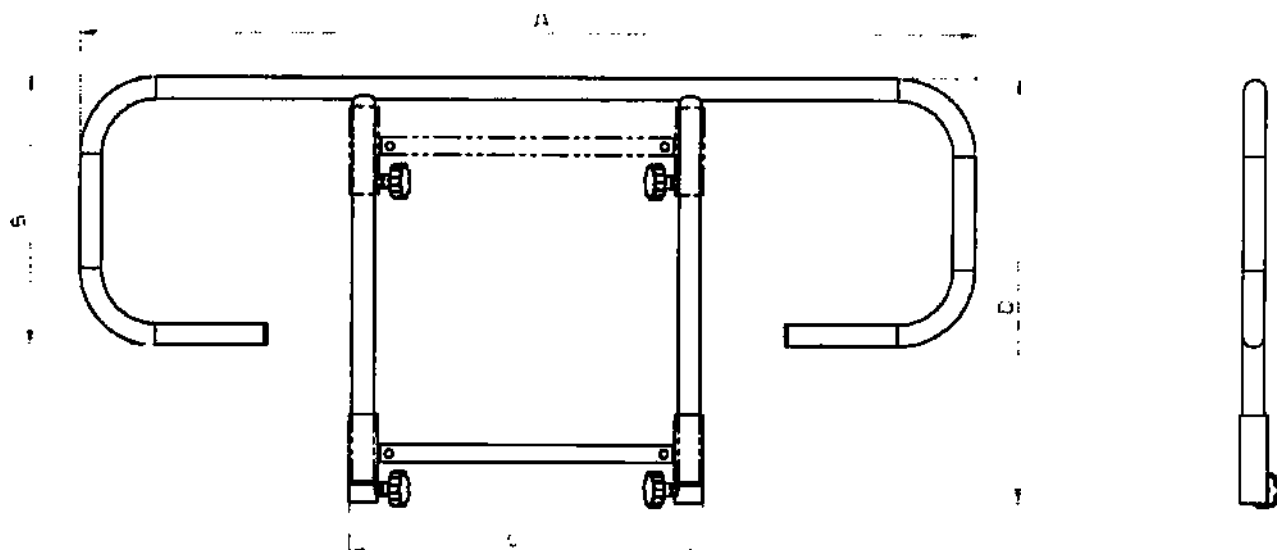


A	B	C	D
1025±2 мм	305±2 мм	405±2 мм	135±2÷485±2 мм

Поручень с деревянной вставкой

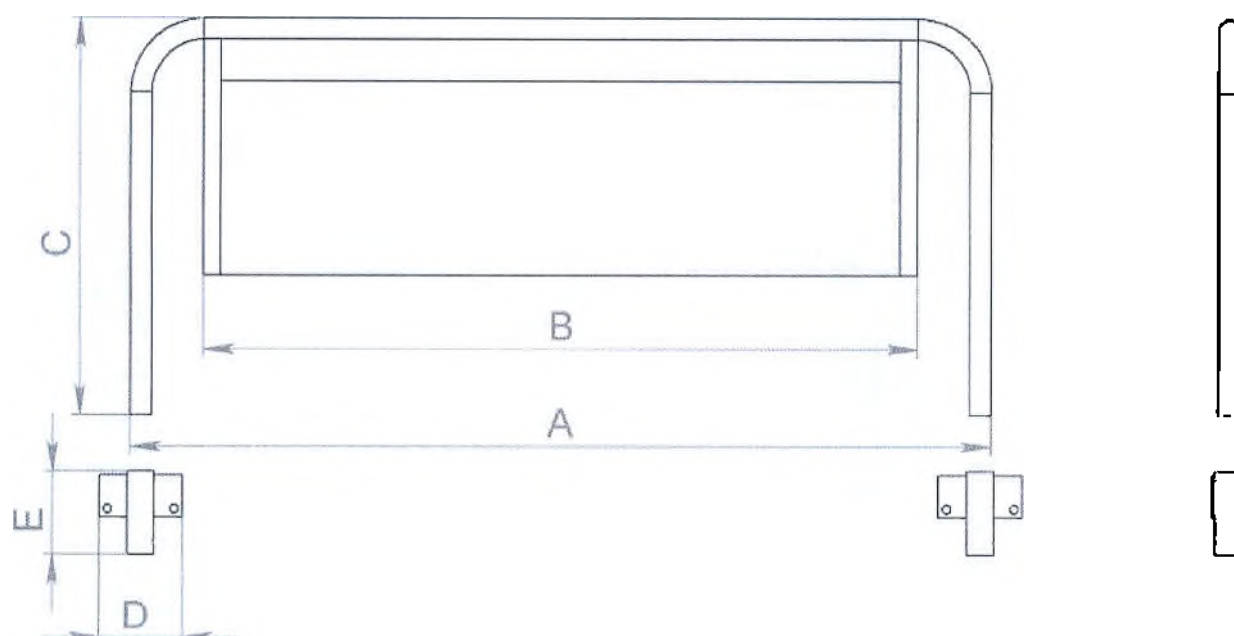


A	B	C	D	E
1025±2 мм	850±2 мм	470±2 мм	100±2 мм	100±2 мм

Складной поручень

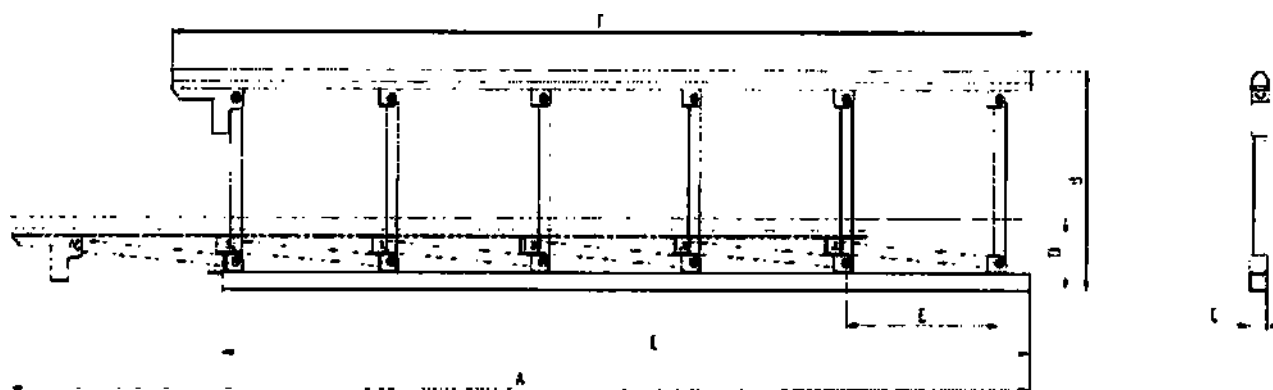


A	B	C	D	E	F	G
1747±5 мм	400±5 мм	1380±2 мм	120±5 мм	260±2 мм	1467±2 мм	30±2 мм

Пластмассовый малый поручень

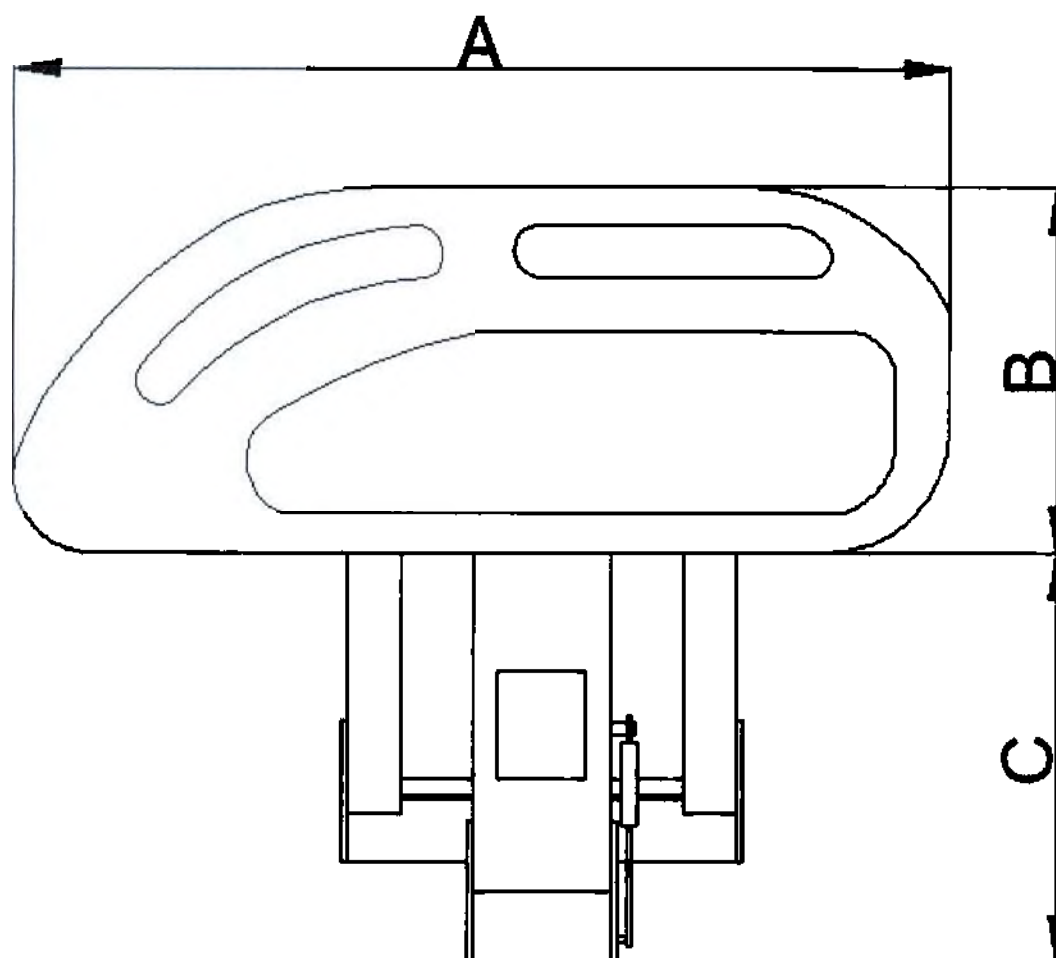

A	B	C
570±2 мм	280±2 мм	260±2 мм

Пластмассовый большой поручень

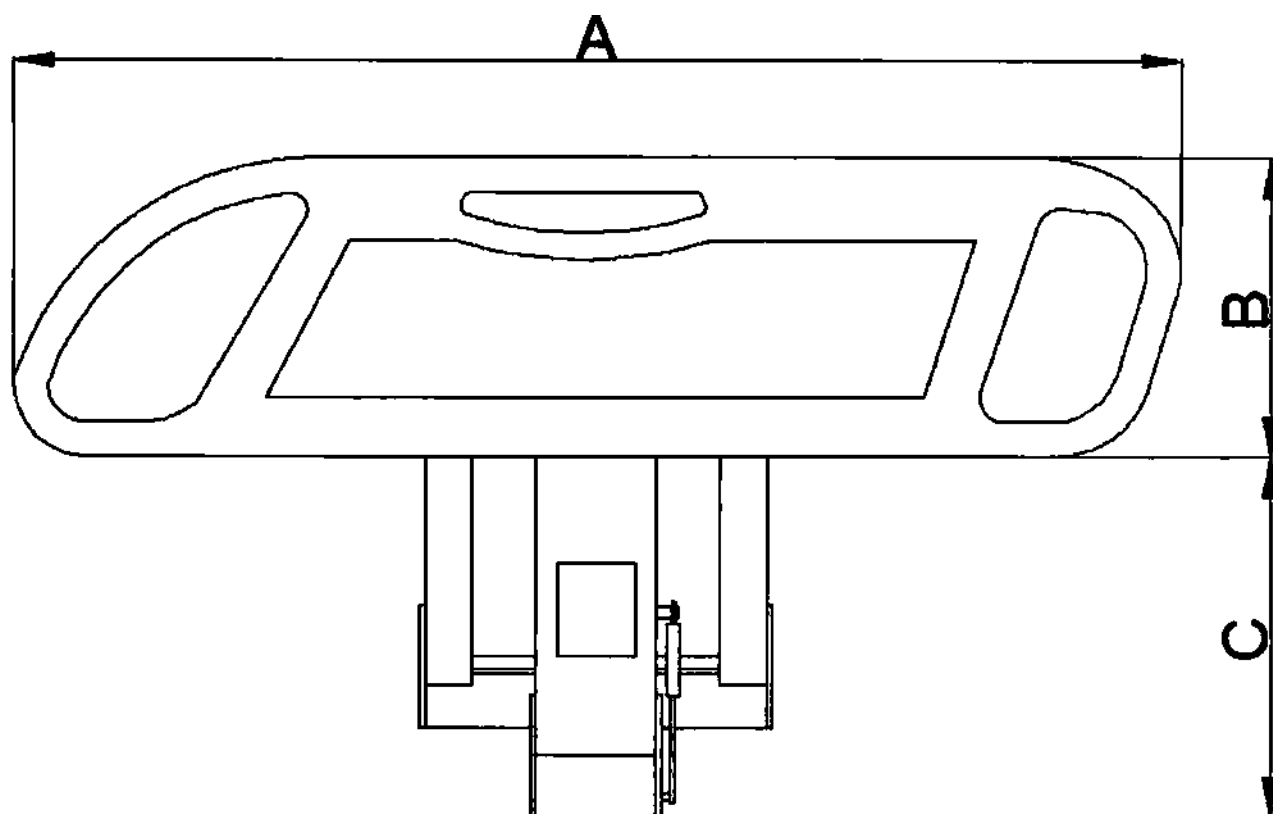


A	B	C
1000±2 мм	250±2 мм	250±2 мм

Приложение 5


Габаритные размеры

Стойка для капельницы из нержавеющей стали

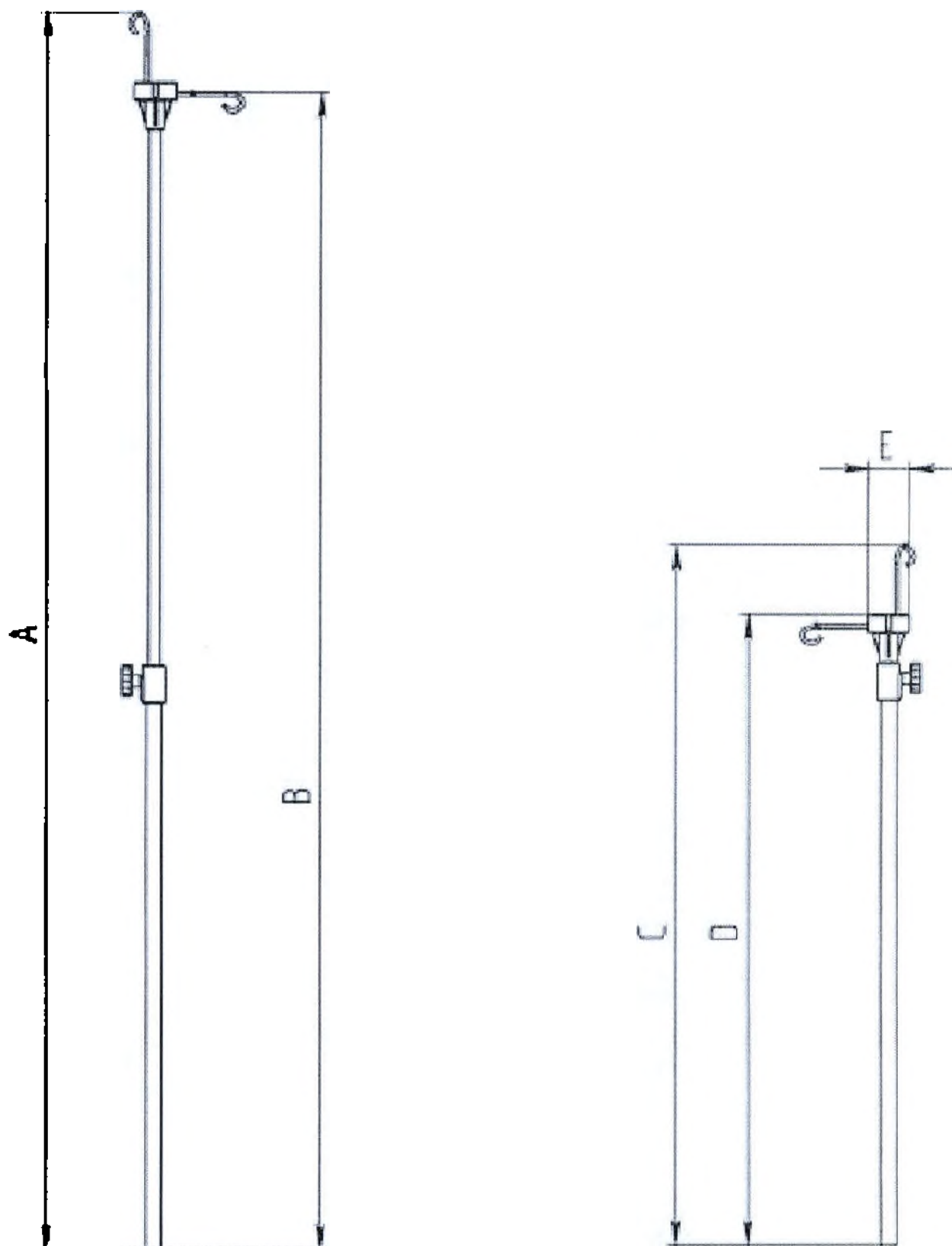

A	B	C	D	E
1485±5 мм	1390±5 мм	865±5 мм	775±5 мм	55±2 мм

Стойка для канельницы из покрашенной стали

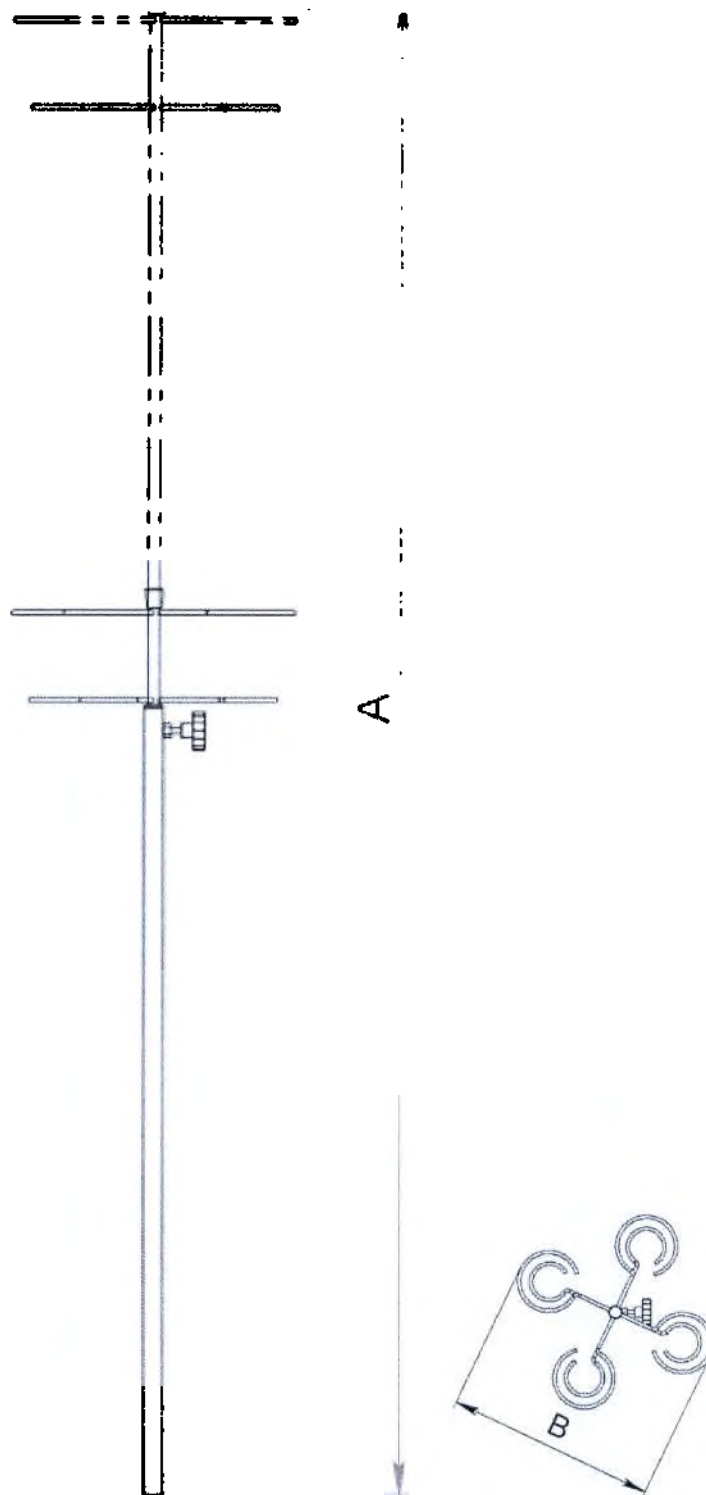


A	B
$930\pm5+1510\pm5$ мм	305 ± 5 мм

Приложение 6

Габаритные размеры

Стойка для подтягивания

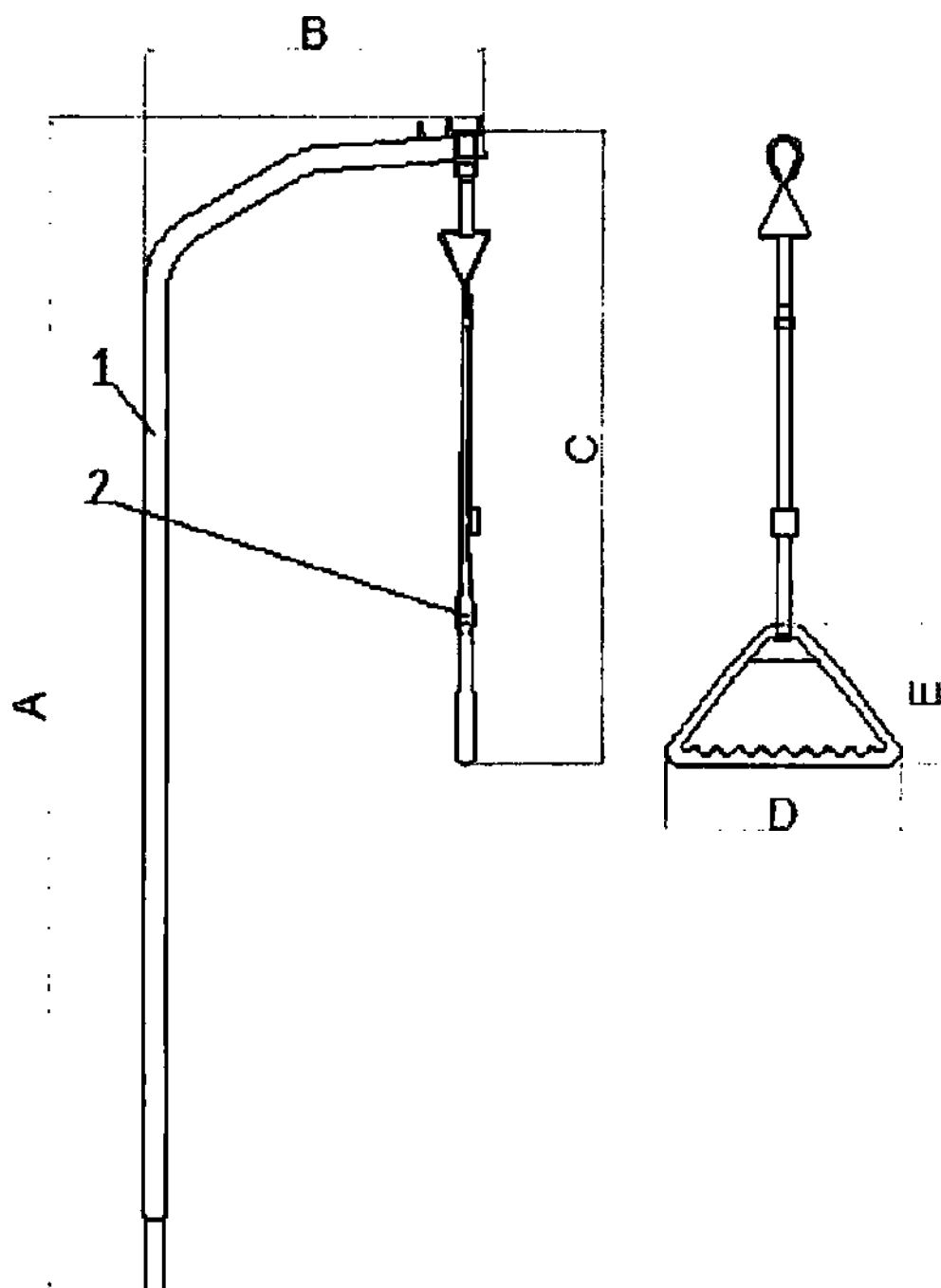


1 – Стойка подтягивания; 2 – Навесной элемент

A	B	C	D	E
1610±5 мм	470±5 мм	450±5÷980±5 мм	270±5 мм	195±5 мм

Приложение 7


Габаритные размеры

Лестница для подтягивания

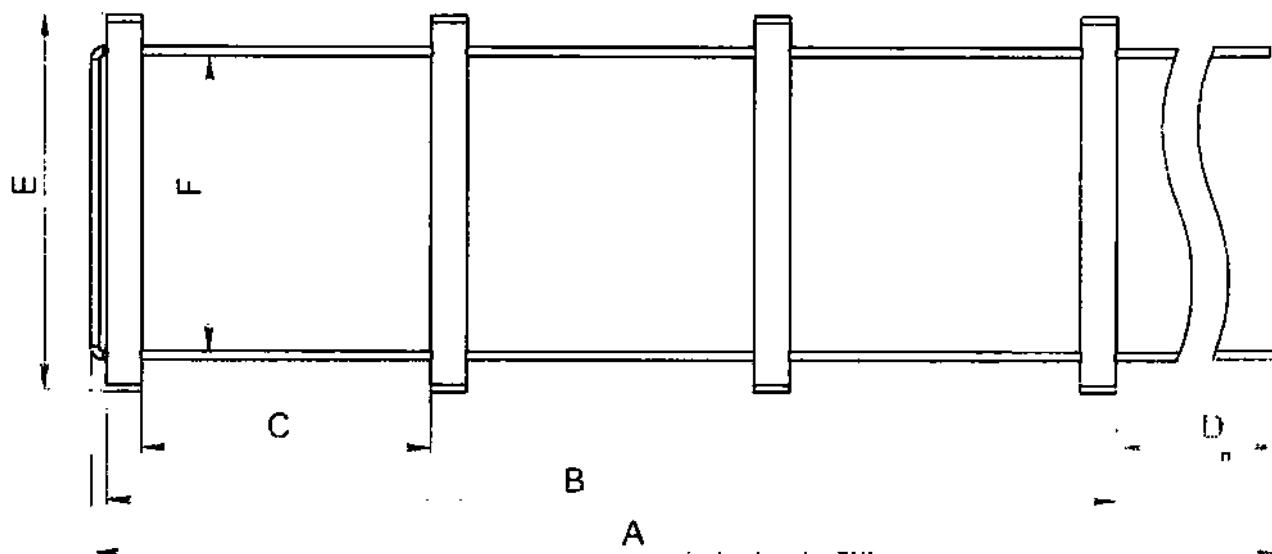

A	B	C	D	E	F
3155±5 мм	700±5 мм	200±5 мм	2445±5 мм	260±5 мм	204±5 мм

Приложение 8
Габаритные размеры
Полка

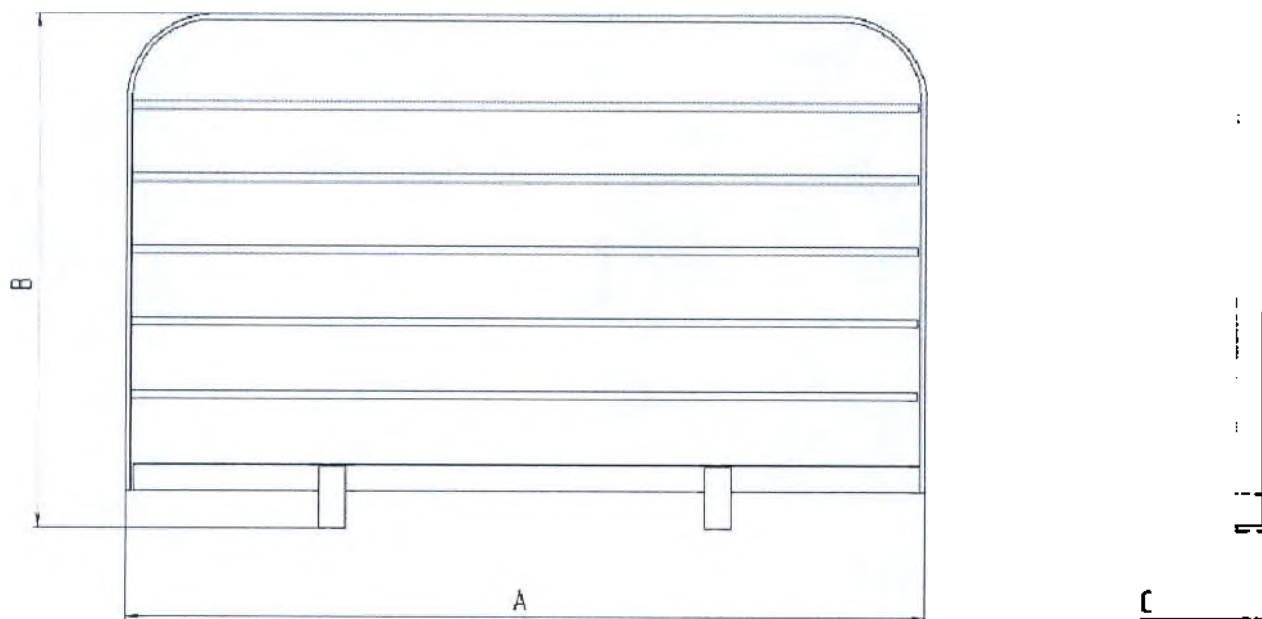


A	B	C
600±5 мм	383±5 мм	24±1 мм



Приложение 9

Схема центрального тормоза

1. Колесо Ø125 с трехпозиционной тормозной системой
2. Колесо Ø125 с двухпозиционной тормозной системой
3. Педаль
4. Эксцентрик
5. Прут (шестигранный)
6. Рычаг 28 мм
7. Винт М8

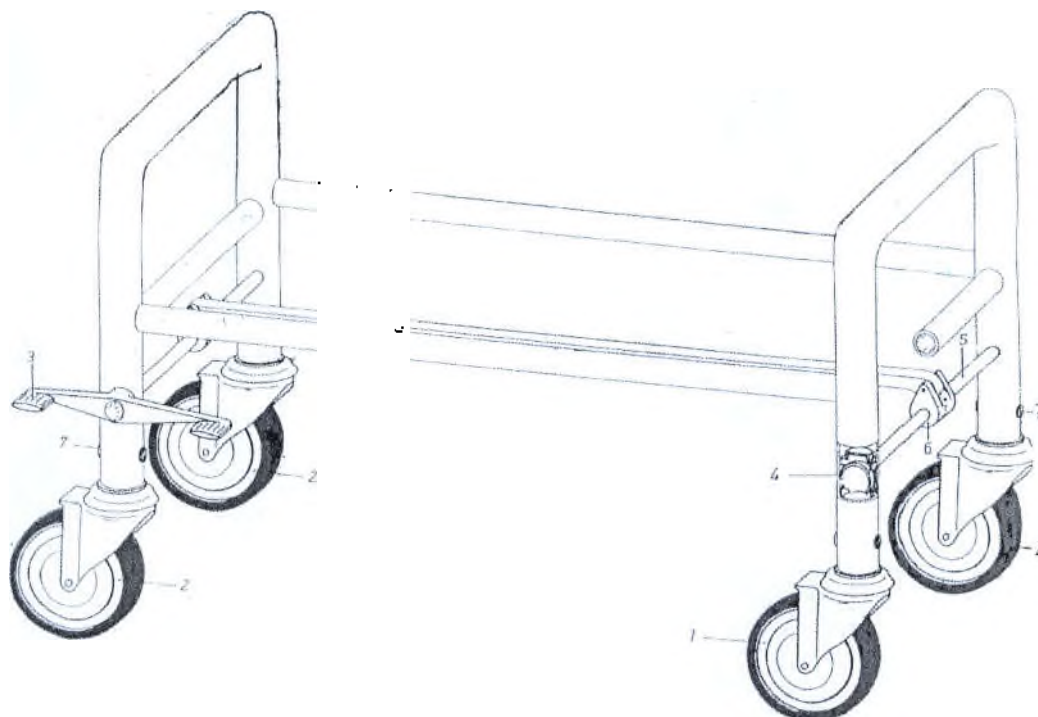

Приложение 10
Габаритные размеры
 Столик

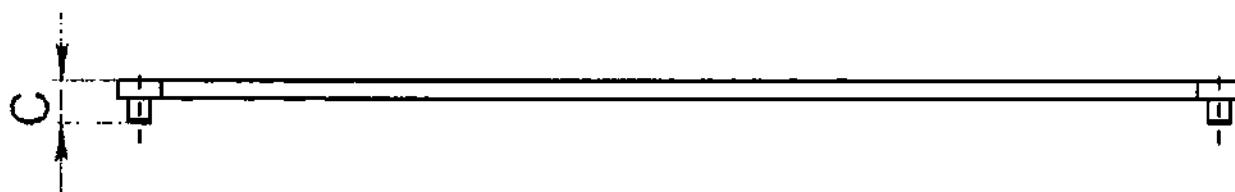
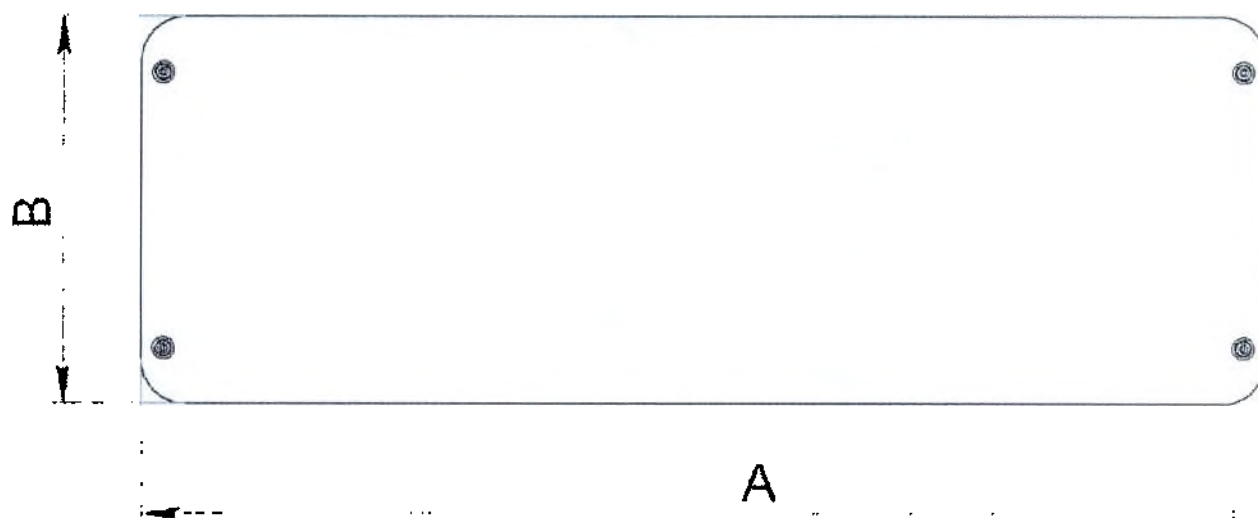


A	B	C
1020±2 мм	350±2 мм	39±2 мм

Приложение 11

Габаритные размеры

Крючок-держатель

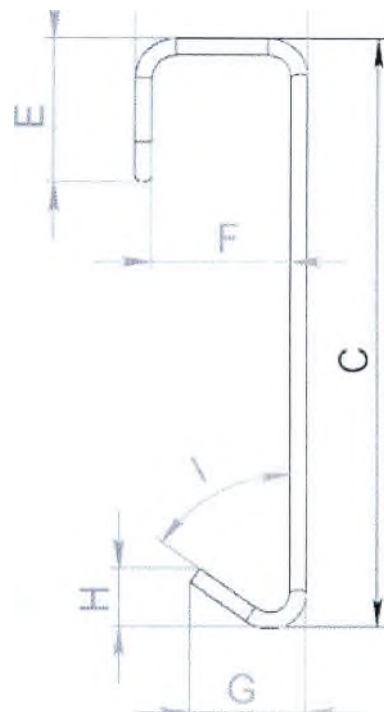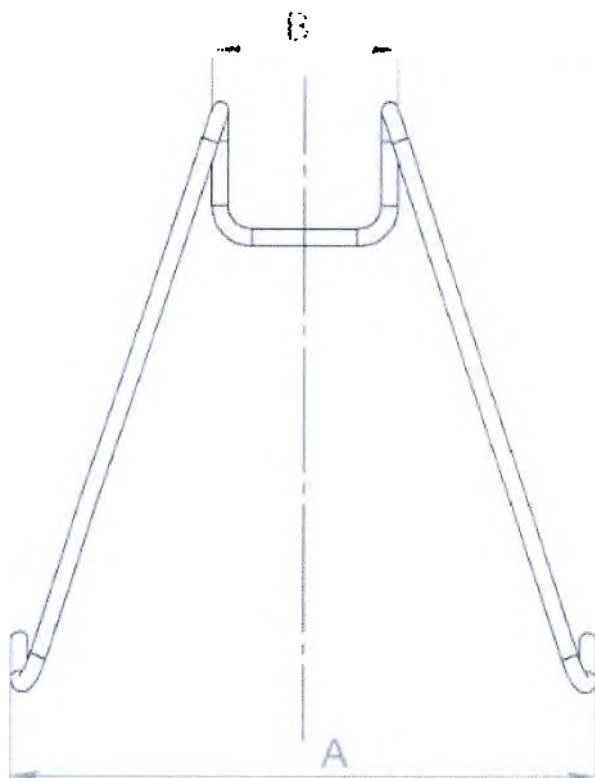


A	B	C	D	E	F	G	H	I
140±2	45±2	140±2	41±2	34±2	33±2	28±1	14±1	55°
MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	±5°

Приложение 12

Габаритные размеры

Пластиковая спинка

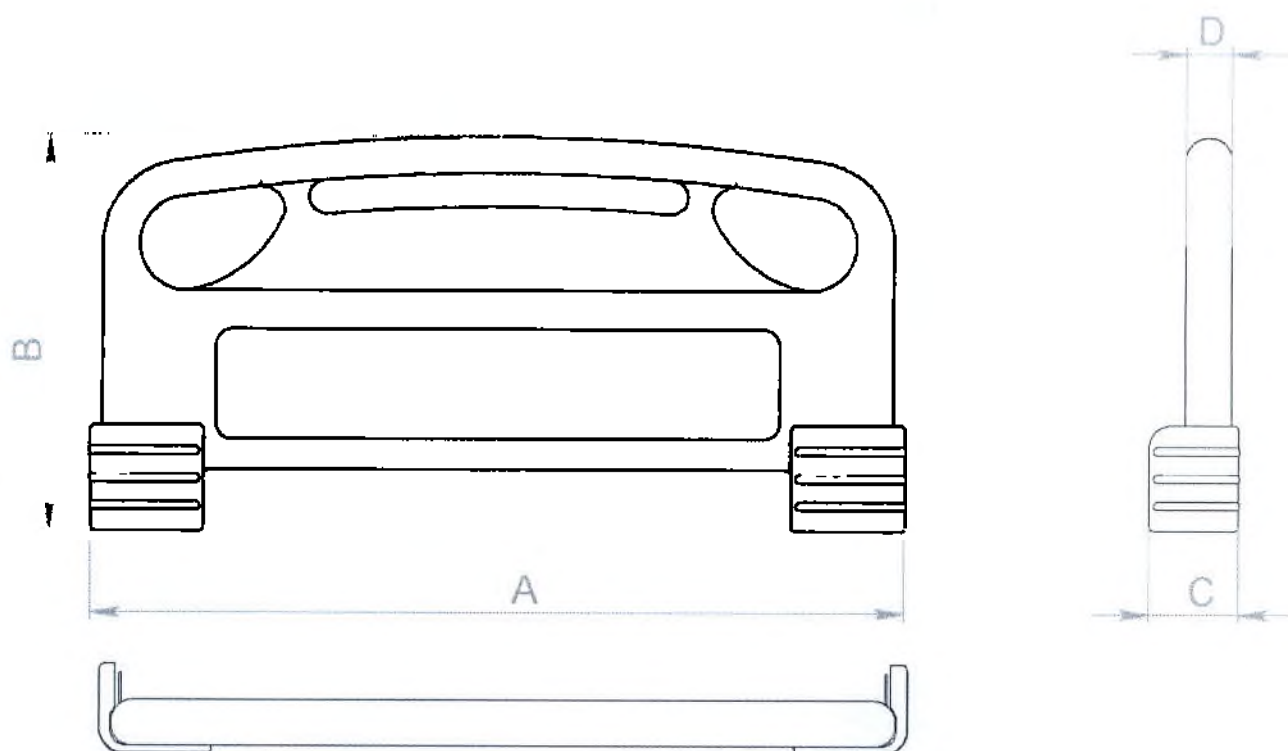


Размеры спинки пластмассовой головной

A	B	C	D
940±5 мм	525±5 мм	100±2 мм	50±2 мм

Размеры спинки пластмассовой ножной


A	B	C	D
940±5 мм	435±5 мм	100±2 мм	50±2 мм

Спинка металлическая

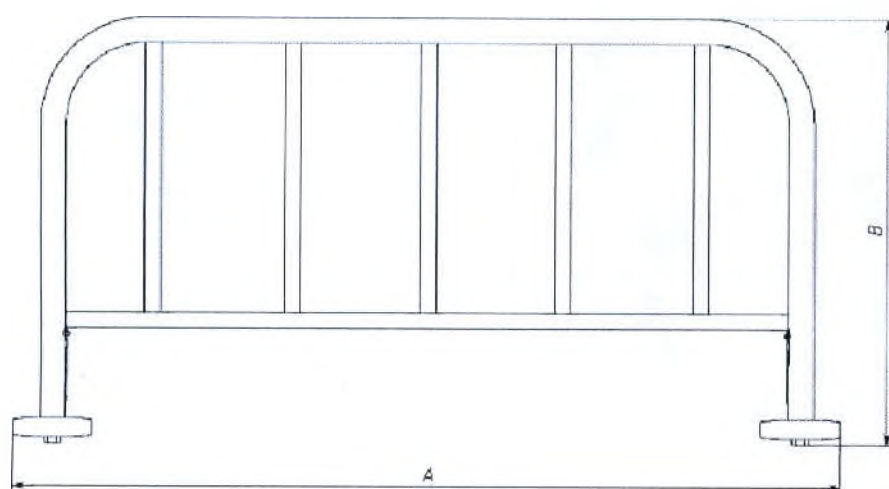

A	B	C
1042±5 мм	532±5 мм	102±4 мм

Спинка металлическая с деревянной вставкой

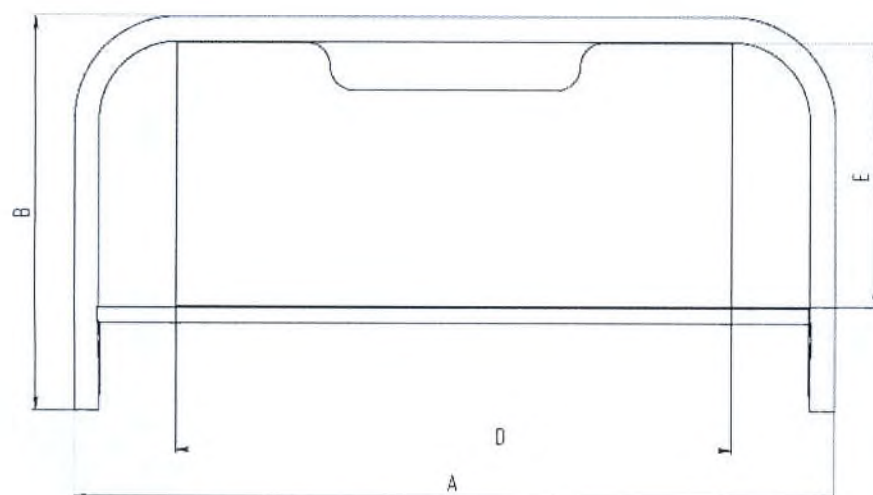

A	B	C	D	E
975±5 мм	500±5 мм	68±2 мм	710±5 мм	336±4 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией Rebq4el -LW1CS0 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-005-27127705-2019

1. Назначение

• Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией Rebq4el-LWICS0 с принадлежностями (далее – кровать, изделия), предназначена для размещения лежащих пациентов и обеспечения физиологически правильного расположения больного.

• Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а также домашние условия.

• Показания к применению:

- размещение лежащих пациентов;

- обеспечение физиологически правильного расположения больного.

• Противопоказания к применению: отсутствуют.

• Безопасная номинальная нагрузка на кровать составляет 150 кг, основанная на весе пациента и весе матраса и дополнительными аксессуарами.

• Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

2. Технические характеристики

2.1 Основные параметры и размеры.

2.1.1 Основные параметры и размеры кровати указаны в таблице 1.

Вид оборудования	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм		Угол наклона секции к гориз., угл. град.			Масса без доп. оборудования, не более, кг.	
			не подъемная	подъемная	спинной	тазобедренной	икроножной	не подъемная	подъемная
Кровать Rebq4el	2230±5	1042±5	950±5	800±5÷1150±5	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°	75	98

2.2 Характеристики:

2.2.1 Кровать должна выдерживать номинальную нагрузку 150 кг, равномерно распределенную на секции и не иметь после сильной нагрузки остаточной деформации.

2.2.2 Механическая прочность кровати должна быть не менее 300 кг.

2.2.3 Кровать может быть оснащена 4-мя колесами диаметром 125±0,5 мм (или стоять на подпятниках). Все колеса должны быть самоориентирующимися и легко без засканий проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна.

2.2.4 Кровать может быть оборудована центральным тормозом, обеспечивающим удержание кровати с пациентом в неподвижном состоянии.

2.2.5 Колеса не должны оставлять на полу помещения никаких отпечатков.

2.2.6 Усилие, прилагаемое к тормозному устройству колес, должно быть не более 100 Н.

2.2.7 Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки, приложенное к спинке в направлении движения вдоль плоскости пола, должно быть не более 100 Н.

2.2.8 Центральные тормоз, должен удерживать от перемещения кровать, с размещенной на ней номинальной нагрузкой, при приложении усилия до 300 Н.

2.2.9 Усилия, прилагаемые к рукояткам механизмов изменения углов наклона секций, с размещенной на них номинальной нагрузкой, не должны превышать 50 Н.

2.2.10 Подъем кровати и регулирование углов наклона секций осуществляется через электрические линейные приводы. Приводы используются двух видов:

Привод в количестве 2-х штук для регулирования углов наклона кровати имеет следующие характеристики:

- Напряжение двигателя: 24 В пост. тока

- Максимальная потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт

- Максимальная скорость в условиях предельной нагрузки: 7,6 мм/с

- Степень пыле-влагозащиты IP66 по ГОСТ 14254

Привод для подъема кровати имеет следующие характеристики:

- Напряжение двигателя: 24 В пост. тока
- Максимальная потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт
- Максимальная скорость в условиях предельной нагрузки: 23,4 мм/с
- Степень пыле-влагозащиты IP66 по ГОСТ 14254

2.2.11 Параметры блока управления

2.2.11.1 Электропитание блока управления осуществляется от сети переменного тока 220±22В, частота 50 Гц.

2.2.11.2 Выходное напряжение блока управления должно быть 24В.

2.2.11.3 Максимальная потребляемая мощность блока питания должна быть не более 200 Вт.

2.2.11.4 Блок управления имеет 4 адаптера для подключения к сети электропитания: I;U; US; AU; UK.

2.2.11.5 К блоку управления может подключаться максимум 3 привода.

2.2.11.6 Степень пыле-влагозащиты IPX4 по ГОСТ 14254.

2.2.12 По безопасности изделие должно соответствовать ГОСТ 30324.0 для изделий класса II, тип В.

2.2.13 Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемый при работе кровати, должен быть не более 45 дБА.

2.2.14 Металлические и неметаллические (неорганические) покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150.

2.2.15 Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104, наружные поверхности должны иметь покрытия не ниже IV класса по ГОСТ 9.032.

2.2.16 Средний срок службы кровати не менее 6 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления кровати путем ремонта.

3. Комплект поставки

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт
1	Кровать медицинская электрическая с регулировкой спинной, тазобедренной, икроножной секций и неподвижной промежуточной секцией с ложементом из стальных ламелей Rebq4el-LW1CS0 по ТУ 32.50.30-005-27127705-2019, в составе:	
1.1	Колеса	4
1.2	Складной поручень	2
1.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
1.4	Устройство для подтягивания в виде лестницы	1
1.5	Спинка металлическая с деревянной вставкой	2
II	Руководство по эксплуатации и паспорт	1

4. Ввод в эксплуатацию

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- Колеса заблокированы (для исполнения с колесами);
 - Источник питания соответствует номинальному (220 В, 50 Гц);
 - Кабель питания подсоединен и проложен таким образом, что его повреждение исключено;
 - Кабели питания приводов и пульта управления не могут быть повреждены при перемещении кровати;
 - Никакие препятствия – ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. – не мешают регулировке.
 - Все регулировочные функции проверены и действуют исправно.
- Только после этого можно приступить к использованию кровати.

4.1 Требования к расположению

• В помещении должно быть достаточно места для полноценной регулировки кровати. Мебель, подоконники и пр. не должны препятствовать регулировке.

• Перед использованием кровати на паркетных полах следует проверить, не приведут ли колеса к обесцвечиванию или другому ущербу. Желательно, чтобы пол помещения был покрыт плиткой, ламинатом или линолеумом.

• Надлежащим образом установленная розетка бытовой электросети должна быть расположена достаточно близко к кровати (предпочтительно).

• При соединении дополнительных электроприборов (компрессоры противопролежневой системы и т.д.) необходимо удостовериться в их функциональности и в том, что они надежно закреплены. В этом случае особое внимание должно быть обращено на безопасную прокладку кабелей, плангов и пр.

• При расположении кровати следует обратить особое внимание на следующие пункты с целью минимизации возможного риска.

• Желательно использовать только огнестойкие матрасы и постельные принадлежности;

• Следует воздерживаться от курения, поскольку матрас и постельные принадлежности могут не быть дымозащитными;

• Дополнительные изделия (такие, как обогревательные одеяла, к примеру) должны быть в исправном рабочем состоянии;

• Следует следить за тем, чтобы данное обогревательное оборудование применялось по прямому назначению, и чтобы никакие изделия не были забыты на или под кроватью во избежание перегрева;

• Желательно избегать применения штепсельных колодок и удлинителей – из-за возможности просачивания жидкостей.

4.2 Готовность к использованию

• Перед первым использованием кровати, а также при ее повторном применении следует провести ее очистку и дезинфекцию.

• После успешного завершения пп 4.1 – 4.2 кровать можно использовать по назначению.

5. Правила безопасности для пользователя

5.1 Правила безопасности пользователей

• Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с кроватью, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы с кроватью перед ее применением. Необходимо привлечь внимание к возможности риска в случае неправильного использования кровати. В особенности это относится к электроприводу и поручням.

• Каждый раз перед использованием кровати проверять ее полную работоспособность.

• Убедиться, что никакие помехи, такие, как мебель, скошенный потолок, подоконники и т.п., не препятствуют регулировке кровати.

• При использовании дополнительного или вспомогательного оборудования – опорных штанг, ламп для чтения, компрессоров для противопролежневой системы и пр. необходимо удостовериться, что это не приведет к спутыванию кабелей питания.

• В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования кровати, необходимо произвести проверку.

5.2 Правила безопасности для пользователей

• Проводить кабель питания таким образом, чтобы не допускать натягивания, перекреста, повреждения движущимися частями во время манипуляций с кроватью.

• Перед перемещением кровати ее необходимо отсоединить от сети. Кабель должен быть помещен в кронштейн (держатель) во избежание его падения или волочения по полу.

• Пульт, если он не используется, следует уложить таким образом, чтобы избежать его самопроизвольного падения (повесить на крюк); необходимо также удостовериться, что кабель не будет поврежден движущимися частями кровати.

- Всегда проверять, переведен ли ложемент в нижнее положение перед тем, как пациент будет оставлен без внимания. Таким образом, можно предотвратить травмирование пациента в случае падения при вставании с кровати или укладывании на нее.

- Чтобы обезопасить пациентов, от непредвиденных автоматических смещений, необходимо, чтобы пульт находился в недоступном месте (например, у изножья кровати) если:

- Пациент не в состоянии безопасно манипулировать кроватью или не может обезопасить себя от потенциально опасных положений;

- Если пациент подвергается риску непреднамеренного движения привода;

- Если ограждения подняты (риск сдавливания или захвата конечностей при корректировке секций);

- Необходимо регулярно проводить визуальную проверку состояния сетевого кабеля на наличие механических повреждений (истирание, оголенные провода, изгибы, точки пережатия и т.д.) Такая проверка должна осуществляться, если:

- Кабель подвергается механической нагрузке (когда его переезжает кровать или тележка для перевозки оборудования, в случае изгиба, растяжения или резких рывков при перемещении кровати, подключенной к сети);

- Кровать перемещается перед включением ее в сеть;

- Проверка также должна проводиться пользователем при постоянном использовании.


- Чтобы обезопасить пациентов, от непредвиденных автоматических смещений, необходимо, чтобы механизмы регулировки кровати были надежно зафиксированы, в момент когда не используются.

- Регулярно проверять фиксаторы для разгрузки натяжения главного кабеля чтобы убедиться, что винты закреплены должным образом.


6. Сборка и установка кровати

6.1 Сборка и установка кровати осуществляется квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем медицинского изделия.

6.2 Поскольку кровать может быть переведена в наклонное (опущенный ножной конец при поднятом головном) положение, очень важно убедиться в том, что головная и ножная части не перепутаны. Соответствующие наклейки находятся на:

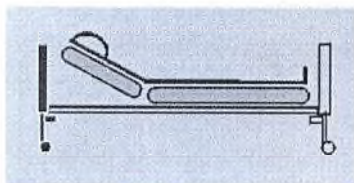


Наклейка головного конца находится на изголовье кровати

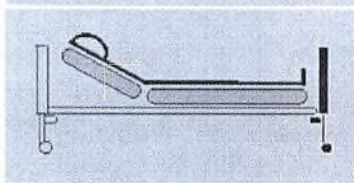

Наклейка ножного конца находится на изножье кровати

6.3 Установка аппаратных колес (при эксплуатации исполнения с колесам)

Ввернуть колеса в торцы опор. Применить одно колесо с тормозом и одно – без. Для лучшей фиксации кровати рекомендуется устанавливать колеса с тормозом по диагонали. Колеса снимаются с блокировки только при необходимости переместить кровать.

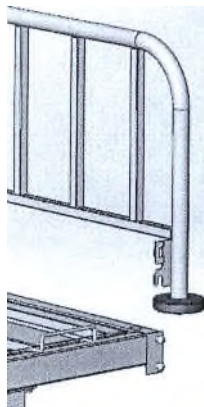

6.4 Установка спинки

По углам рамы кровати имеются два опорных штыря. Для установки спинки поднимите фиксаторы установочных пластин на спинках и опустите спинку на штыри, после чего опустите фиксаторы.

6.5 Складной поручень

Положение складного поручня регулируется кнопкой, находящейся в верхней его части. Удерживая кнопку, установить поручень в нужное положение (опущенное (сложенное) или поднятое).

Не используйте поручни в качестве опоры!

6.6 Лестница для подтягивания

Лестница для подтягивания используется пациентом для самостоятельного поднятия из лежачего положения. Пациент приподнимает тело, поочередно цепляясь за перекладины. Лестница крепится в ножной части кровати с помощью удлиненных концов веревки.

7. Функционирование кровати

7.1 Специальные правила безопасности для регулировочных механизмов



опасность

• При регулировке кровати необходимо следить за тем, чтобы конечности пациентов, пользователей или других лиц, не находились под секциями или ложем, поскольку возможен их захват с последующим травмированием.

• При использовании вспомогательного оборудования всегда необходимо проверять следующее: вспомогательное оборудование не создает сдавливающих или срезающих зон, представляющих опасность для пациента при регулировке спинной, тазобедренной и икроножной секций.

• Убедиться, что кабели питания и пульта управления не подвергнутся повреждению.



• Перед перемещением кровати убедиться в том, что кабель питания не будет растянут, прижат колесом или поврежден каким-либо другим способом. При перемещении кровати кабель должен быть зафиксирован в держателях (крюпштейнах).

• Во избежание повреждений убедиться в том, что никакие препятствия, как, к примеру, мебель или скошенный потолок, не мешают регулировке.

• Продолжительность операций не должна превышать двух минут. После этого должен быть период покоя длительностью не менее 18 минут. (альтернатива: минута активности с последующими 9 минутами покоя и т.д.).

• Как и любое электрическое устройство, приводная система кровати может порождать шумы и помехи в работе других электромагнитных устройств. В этом случае следует увеличить расстояние до таких устройств или не использовать одну и ту же розетку электрической сети.

7.2 Применение пульта

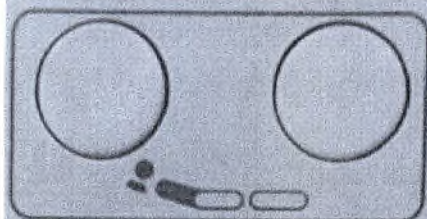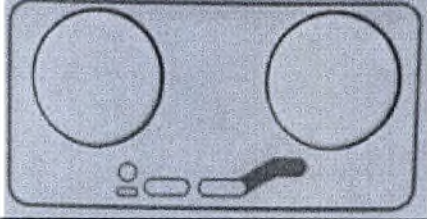	Регулировка спинной секции Нажатием этих клавиш можно изменять угол спинной секции.
	Регулировка тазобедренной секции Изменение угла тазобедренной секции.
	Регулировка икроножной секции Изменение угла наклона икроножной секции
	Регулировка высоты ложа Выбор высоты матрасного основания.
	Стрелки на пульте управление указывают направление движения при нажатии соответствующей кнопки

7.3 Регулировка секций

В обычном случае, когда необходимо приподнять головную секцию, пользователю следует использовать пульт управления. Нажатием на соответствующую выбранной секции кнопку «вверх» на пульте управления секции будут подниматься; нажимайте на кнопку «вниз» выбранная секция будет опускаться. Остановить поднятие или опускание секций можно в любом положении.

Также на пульте есть кнопка «одновременный наклон спинной и ножной секции». Из горизонтального положения ножная секция поднимается автоматически вместе со спинной.

8. Очистка и дезинфекция

8.1 Общая информация

Очистка – это самое важное средство и требование для успешной химической дезинфекции. Когда кровать используется одним и тем же пациентом, рутинная очистка кровати весьма существенна для обеспечения гигиенической обстановки. Дезинфекция ходовой части необходима только в том случае, когда она видимо загрязнена инфекционными или потенциально инфекционными материалами (кровь, стул, гной) или, при инфекционной болезни, по указанию врача. Кровать должна быть протерта и продезинфицирована перед тем, как ее займет новый пациент!



внимание

Перед очисткой и дезинфекцией

- Отсоединить кабель питания и упаковать вилку таким образом, чтобы исключить попадание воды и водных растворов.
- Убедиться, что все разъемы вставлены полагающимся образом.

- Электрические компоненты не должны иметь видимых повреждений. В противном случае проникновение воды или водных растворов может привести к их порче.

- Перед возобновлением пользования кроватью убедиться в отсутствии остаточной влаги просушкой или продувкой кабеля питания.

- Электрические компоненты не должны промываться струей воды или воздухом под давлением; их можно только протирать влажной тканью.

- В случае подозрения на попадание воды на электрические компоненты следует сразу же отключить кабель питания, принять меры к тому, чтобы он не был вновь включен.

- Несоблюдение этих правил может привести к порче оборудования и привести к перебоям в работе.

8.2 Инструкции по очистке и дезинфекции

- Снять постельное белье и отправить в прачечную.

- Прочистить все поверхности, включая реечную раму (ламели) кровати мягким экологически чистящим раствором.

- Если кровать загрязнена инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать ее протиркой агентами, одобренными СЭС и пригодными для соответствующих поверхностей. Дезинфекция колес должна производиться только в том случае, если они видимо загрязнены инфекционными или потенциально инфекционными материалами.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только в больницах, при наличии у пациента мультирезистентного патогенна.

Дезинфекция кровати непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистых» и «грязных» кроватей при их транспортировке. Это в свою очередь, предотвращает распространение внутрибольничных болезнетворных микроорганизмов, что может быть обеспечено следованием данным рекомендациям.

Неиспользуемая кровать должна быть отправлена на хранение в накрытом состоянии, для предохранения ее от загрязнения.

8.3 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы кровати следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.

- Рекомендуется протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.

- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.



- Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

8.3.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.

- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.

- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.

- После завершения дезинфекции проветрить помещение.

- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление, при котором выделяются

большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.

- Кроме того, протирка имеет более существенное значение.

8.4 Метод дезинфекции

Дезинфекцию проводят протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% универсального моющего средства, при температуре раствора не менее плюс 18 °С, два раза с интервалом между протираниями 10 -15 минут.

9. Техническое обслуживание

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 6 лет в зависимости от условий и частоты применения.



опасность

Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

С этой целью необходимо проводить регулярный осмотр кровати для обеспечения постоянной гарантии ее безопасности и проверки работоспособности, как описано ниже.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

Рекомендации:

Ежемесячная проверка всех механических компонентов.



опасность

В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

9.1 Замена электрических компонентов



высокое
напряжение

Опасность электрического поражения!

- До начала какой-либо работы следует отключить кабель питания от источника напряжения.
- Любая работа на приводе или его ремонт могут производиться только инженером по техобслуживанию, производителем или авторизованным квалифицированным электриком.



опасность

- Разбирать систему электропривода можно только в том случае, когда матрасная рама находится в горизонтальном положении. В противном случае есть опасность травмы в результате падения рамы.

Все компоненты электропривода не подлежат техобслуживанию и не могут быть открыты. В случае любой неисправности они должны быть целиком заменены.

Для поддержания работы и для осуществления гарантийных обязательств должны использоваться только оригинальные изделия.

10. Транспортирование и хранение

Эксплуатация	Температура	+10°C....+35° C
	Влажность (без конденсации)	30%.....75%
Транспортировка и хранение	Температура	-50°C....+50° C
	Влажность (без конденсации)	30%.....75%

11. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие качества кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-005-27127705-2019 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В гарантию не входят поломки, возникшие по причине ненадлежащей эксплуатации.

По вопросам гарантийного или текущего ремонта обращаться к: Обществу с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

12. Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эпидемиологически безопасные отходы.

Электрические части кровати должны быть собраны и переданы специальным лицензированным организациям, занимающимся утилизацией электрического и электронного оборудования. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

13. Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Печать, подпись _____

ООО "РЕАБИЛИТИК"
Итого в настоящем документе

96 _____ листа (ов)

Генеральный директор
Мухин А.А.

