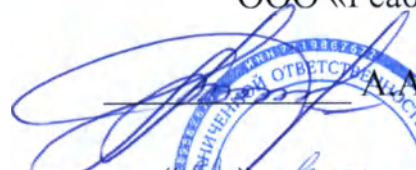


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Реабилитик»


А.А. Мухин
«15» августа 2019 г.


**Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой
спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebq3 с принадлежностями**

по ТУ 32.50.30-003-27127705-2019

Руководство по эксплуатации и паспорт

	СОДЕРЖАНИЕ	
1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2	ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
3	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	7
4	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРОВАТИ	8
5	ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ	10
6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
7	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
9	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15
10	ГАРАНТИЯ	16
11	УТИЛИЗАЦИЯ	16
12	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ	16
13	МАРКИРОВКА	17
14	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	17
15	ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	17
	Приложение 1	18
	Приложение 2	20
	Приложение 3	62
	Приложение 4	63
	Приложение 5	66
	Приложение 6	68
	Приложение 7	69
	Приложение 8	70
	Приложение 9	71
	Приложение 10	72
	Приложение 11	73
	Приложение 12	74
	ПАСПОРТ	75

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед первым использованием кровати:

- Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы избежать повреждений, вызванных ошибочными действиями.
- Перед использованием протрите или продезинфицируйте кровать.

Данное Руководство содержит полную информацию о правилах безопасности, которым необходимо неукоснительно следовать. Все пользователи, работающие с медицинской кроватью, должны быть хорошо ознакомлены с этой инструкцией, и следовать всем указаниям о безопасном использовании.

1.1 Определение лиц и групп

Квалифицированный персонал по сборке кровати

Квалифицированный персонал должен ознакомиться с данной инструкцией.

Пользователь

Пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией.

Пациент

В данном Руководстве Пациентом названы недееспособные или нуждающиеся в уходе больные, занимающие эту кровать.

1.2 Информация о безопасности

Кровать представляет собой изделие, соответствующее современным технологиям.

Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebg3 с принадлежностями может быть использована только в случае абсолютной уверенности в ее исправном состоянии.

1.2.1 Интерпретация использованных символов

Знаки, предупреждающие о личной опасности:



Данный знак сообщает об опасности для жизни или здоровья.

Предупреждение об опасности ущерба для имущества



Этот знак сигнализирует о возможном ущербе для имущества.

Другие рекомендации



Общие замечания, призванные облегчить применение кровати и лучшего понимания принципов ее использования.

Символы безопасности не могут быть заменой ознакомлению с Руководством, вследствие чего внимательное прочтение и неукоснительное следование приведенной информации о безопасности, является необходимым.

1.2.2 Правила безопасности пользователей

• Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с кроватью, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы с кроватью перед ее применением. Необходимо привлечь внимание к возможности риска в случае неправильного использования кровати. В особенности это относится к поручням.

- Каждый раз перед использованием кровати проверять ее полную работоспособность.
- Убедиться, что никакие помехи, такие, как мебель, скошенный потолок, подоконники и т.п., не препятствуют регулировке кровати.

• В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования кровати, необходимо произвести проверку.



1.2.3 Правила безопасности для пользователей

• Всегда проверять, переведен ли ложемент в нижнее положение перед тем, как пациент будет оставлен без внимания. Таким образом, можно предотвратить травмирование пациента в случае падения при вставании с кровати или укладывании на нее.

• Чтобы обезопасить пациентов, от непредвиденных автоматических смещений, необходимо, чтобы механизмы регулировки кровати были надежно зафиксированы, в момент когда не используются.

1.3 Описание изделия

Кровать выпускается в следующих исполнениях: см. Приложение 1.

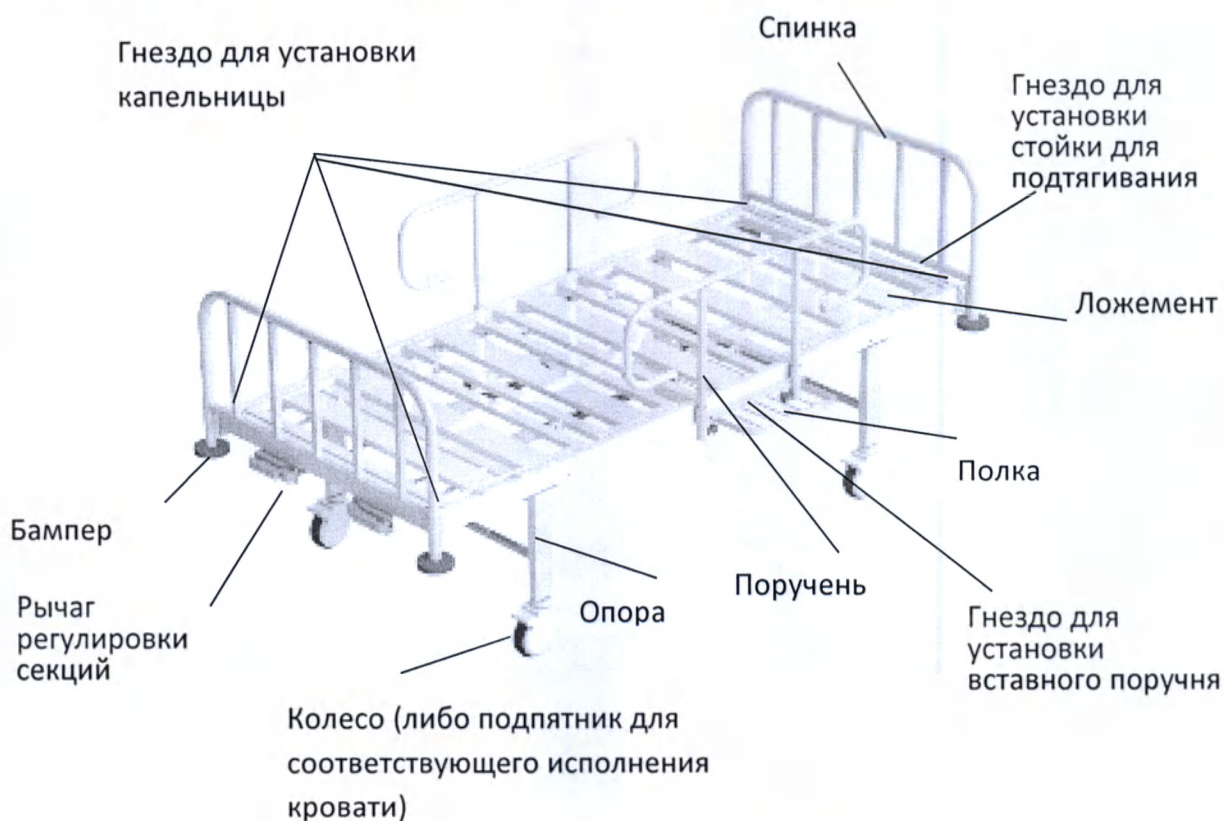


Рисунок 1. Общий вид кровати

1.3.1 Назначение

• Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebq3 с принадлежностями (далее – кровать, изделия), предназначена для размещения лежачих пациентов и обеспечения физиологически правильного расположения больного.

• Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а также домашние условия.

• Показания к применению:

- размещение лежачих пациентов;
- обеспечение физиологически правильного расположения больного.

• Противопоказания к применению: отсутствуют.

• Безопасная номинальная нагрузка на кровать составляет 150 кг, основанная на весе пациента и весе матраца и дополнительными аксессуарами.

• Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании

кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

1.3.2 Комплект поставки

Комплект поставки кровати представлен в приложении 2.

Кровать с ложементами

Рама разделена на секции: спинную, тазобедренную и икроножную. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка осуществляется ручным механизмом.

Поручень

Для предотвращения падения пациента с кровати предусмотрены поручни с обеих сторон, которые служат барьером и по мере необходимости могут убираться.

Поручни могут быть: - поручень вставной:

- поручень с деревянной вставкой;
- складной поручень;
- пластмассовый малый поручень;
- пластмассовый большой поручень.

Стойка для капельницы

Для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемых при проведении лечебных процедур.

Стойка для капельницы может быть: - стойка для капельницы из нержавеющей стали с 2-мя складными крючками;

- стойка для капельницы из покрашенной стали с держателями.

Стойка для подтягивания

Для самостоятельного принятия пользователем более удобного положения в кровати.

Лестница для подтягивания

Для самостоятельного принятия пользователем сидячего положения в кровати.

Принадлежности:

Полка

Для размещения судна.

Центральный тормоз

Для единой регулировки тормозной системы колес.

Столик

Для размещения инструментов, медикаментов, дезинфицирующих средств, туалетных принадлежностей и т.п.


Крючок-держатель

Для размещения мочеприемника.


2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Сборка и установка кровати осуществляется квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем медицинского изделия.


Поскольку кровать может быть переведена в наклонное (опущенный ножной конец при поднятом головном) положение, очень важно убедиться в том, что головная и ножная части не перепутаны. Соответствующие наклейки находятся на:

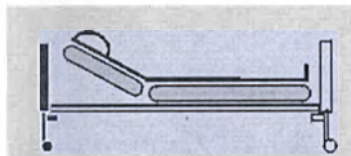

Наклейка головного конца находится на изголовье кровати

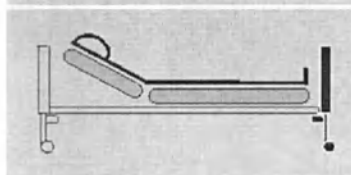

Наклейка ножного конца находится на изножье кровати

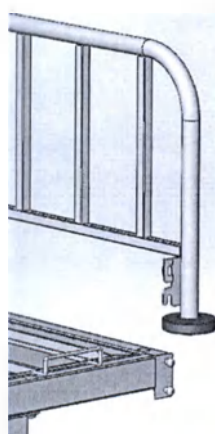

2.1 Установка аппаратных колес (при эксплуатации исполнения с колесам)

Ввернуть колеса в торцы опор. Применить одно колесо с тормозом и одно – без. Для лучшей фиксации кровати рекомендуется устанавливать колеса с тормозом по диагонали. Колеса снимаются с блокировки только при необходимости переместить кровать.

2.2 Установка спиннок

По углам рамы кровати имеются два опорных штыря. Для установки спиннок поднимите фиксаторы установочных пластин на спинках и опустите спинку на штыри, после чего опустите фиксаторы.

2.3 Установка поручней

2.3.1 Установка складного поручня

Прикрутить складной поручень к раме кровати, совместив отверстия на нижней трубе поручня с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х50 с плоск.гол. с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн. винт. Zn. См. рис. 1.

2.3.2 Установка вставного поручня

Прикрутить держатель поручня к раме кровати, совместив отверстия на трубе держателя с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn. Чтобы установить поручень в рабочее положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.3 Установка вставного поручня с деревянной вставкой

Прикрутить держатель поручня к раме кровати, совместив отверстия на трубе держателя с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn. Чтобы установить поручень в рабочее положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.4 Установка пластикового поручня (большого или малого)

Прикрутить поручень к раме кровати, совместив отверстия на крепежной пластине поручня с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предусмотренный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn.

Не используйте поручни в качестве опоры!

Установка аксессуаров

Установить аксессуары на места, указанные на рисунке 1. Гнездо для установки стойки для подтягивания, снабжено болтовым фиксатором, который для фиксации стойки необходимо закрутить.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- Колеса заблокированы (для исполнения с колесами);
- Никакие препятствия – ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. – не мешают регулировке.

- Все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к использованию кровати.

3.1 Требования к расположению

- В помещении должно быть достаточно места для полноценной регулировки кровати. Мебель, подоконники и пр. не должны препятствовать регулировке.

- Перед использованием кровати на паркетных полах следует проверить, не приведут ли колеса к обесцвечиванию или другому ущербу. Желательно, чтобы пол помещения был покрыт плиткой, ламинатом или линолеумом.

При расположении кровати следует обратить особое внимание на следующие пункты с целью минимизации возможного риска.

- Желательно использовать только огнестойкие матрасы и постельные принадлежности;

- Следует воздерживаться от курения, поскольку матрас и постельные принадлежности могут не быть дымозащитными;

- Дополнительные изделия (такие, как обогревательные одеяла, к примеру) должны быть в исправном рабочем состоянии;

- Следует следить за тем, чтобы данное обогревательное оборудование применялось по прямому назначению, и чтобы никакие изделия не были забыты на или под кроватью во избежание перегрева;

- Желательно избегать применения штепсельных колодок и удлинителей – из-за возможности просачивания жидкостей.

3.2 Готовность к использованию

- Перед первым использованием кровати, а также при ее повторном применении следует провести ее очистку и дезинфекцию в соответствии с гл. 5.

- После успешного завершения пп 3.1 – 3.2 кровать можно использовать по назначению.

4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРОВАТИ

4.1 Специальные правила безопасности для регулировочных механизмов



- При регулировке кровати необходимо следить за тем, чтобы конечности пациентов, пользователей или других лиц, не находились под секциями или ложем, поскольку возможен их захват с последующим травмированием.
- При использовании вспомогательного оборудования всегда необходимо проверять следующее: вспомогательное оборудование не создает сдавливающих или срезающих зон, представляющих опасность для пациента при регулировке спинной, тазобедренной и икроножной секций.

4.2 Колеса (в случае исполнения кровати с колесами)


Медицинская кровать оснащена четырьмя колесами, два из которых с индивидуальными тормозами.



- При перемещении кровати ложе должно находиться в низшем положении.

Разблокировка: Толкнуть ногой переключатель отпуска тормоза в направлении ножки кровати.

Блокировка: Нажать ногой рычаг торможения.

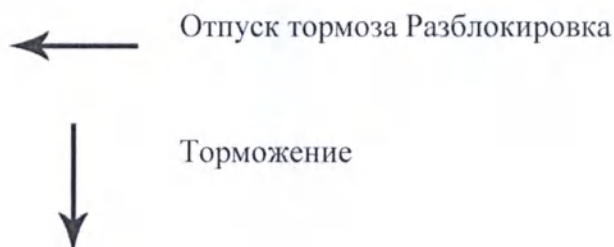

Два колеса на кроватях снабжены отдельным тормозом. Колеса блокируются, пока педаль тормоза фиксирует их в неподвижном положении. Тормоз отключается нажатием на разблокировочную педаль. Колеса кровати должны быть заблокированы, если необходимо, чтобы кровать находилась в неподвижном состоянии.

4.3 Регулировка секций

В обычном случае, когда необходимо приподнять головную секцию, пользователю следует выдвинуть рычаг с правой стороны. Рычаг можно крутить после того, как он выдвинут и зафиксирован. Вращайте по часовой стрелке, и головная секция будет подниматься; вращайте против часовой стрелки, и головная секция будет опускаться. Остановить вращение можно в любой позиции установленных пределов. Затем сложите рычаг и верните его в исходное положение.

Когда необходимо приподнять тазобедренную секцию, пользователю следует выдвинуть рычаг с левой стороны. Рычаг можно крутить после того, как он выдвинут и зафиксирован. Вращайте по часовой стрелке, и тазобедренная секция будет подниматься; вращайте против часовой стрелки, и тазобедренная секция будет опускаться. Остановить вращение можно в любой позиции установленных пределов. Затем сложите рычаг и верните его в исходное положение.

Икроножную секцию можно приподнять или опустить с помощью ручек, которые расположены на самом ложементе.

4.4 Поручни

4.4.1 Складной поручень

Положение складного поручня регулируется кнопкой, находящейся в верхней его части. Удерживая кнопку, установить поручень в нужное положение (опущенное (сложенное) или поднятое).

4.4.2 Вставной поручень

Вставной поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

4.4.3 Поручень вставной с деревянной вставкой

Поручень с деревянной вставкой имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

4.4.4 Пластиковый поручень (большой и малый)

Пластиковый поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, нужно потянуть его вверх. Чтобы опустить поручень, необходимо отжать фиксатор.

Не используйте поручни в качестве опоры!

Правила безопасности при пользовании поручней

Боковые поручни служат для того, чтобы обезопасить пациента от случайного падения с кровати. Они не предназначены для того, чтобы помешать пациенту сойти с кровати. В таких случаях надо обратить особое внимание на следующие правила:

- Необходимо пользоваться только исправными неповрежденными боковыми поручнями.
- Удостовериться в том, что применяются поручни, поставляемые непосредственно с кроватью.
- При использовании кровати с поручнями необходимо принять во внимание соответствие ее характеристик телосложению пациента. Следует учесть расстояние между планками и крестовинами в отношении к конституции пациента. Для людей с небольшими размерами необходимо предусмотреть дополнительные предохранительные средства (в комплектацию данной модели такие средства не входят). Это может оказаться единственным способом предупреждения защемления пациента или его проскальзывания между планками.
- Регулярно проверять состояние боковых поручней и механических компонентов, осуществляющих их закрепление на ходовой части на наличие повреждений. Такая проверка должна проводиться не только перед установкой поручней, но также во время их применения на регулярной основе (по меньшей мере во время повторного использования).
- Чтобы обезопасить пациента от случайных автоматических регулировок необходимо всегда блокировать регулировку управления спинной секции при боковых поручнях (для устранения опасности зажатия и сдавливания конечностей).

Если эти правила не будут соблюдаться, это создаст опасность застревания конечностей пациента в боковых поручнях или его падения сквозь промежутки между планками, если они слишком велики в случае несоответствия размеров ограждений или при их неполном соединении.

4.5 Лестница для подтягивания

Лестница для подтягивания используется пациентом для самостоятельного поднятия из лежачего положения. Пациент приподнимает тело, поочередно цепляясь за перекладины. Лестница крепится в ножной части кровати с помощью удлиненных концов веревки.

4.6 Стойка для подтягивания

В головной части рамы кровати находятся два гнезда для расположения стойки для подтягивания.

Установка

Установить стойку в специально предназначенное гнездо (см. рис. 1). Зафиксировать положение болтовым фиксатором.


Демонтаж

Выкрутить болтовой фиксатор. Вытащить стойку в направлении вверх.

Пределы вращения стойки. Раскачивание стойки вне площади, занимаемой кроватью, может привести к ее опрокидыванию при приложении веса к штанге. Для предотвращения этого убедиться, что болтовой фиксатор закручен надежно.

Регулировка высоты опорной ручки.

Длина ремня опорной ручки может меняться в пределах 33-93 см с помощью регулировочных стяжек.

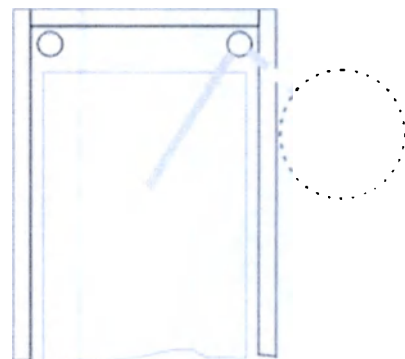

4.7 Стойка для капельницы

Капельница устанавливается в одно из четырех гнезд, указанных на рисунке 1.

4.8 Полка

Полка устанавливается под рамой кровати с ложементами на одну из опор. Крюки полки надеваются на поперечную трубу опоры.

4.9 Столик

Столик устанавливается на поручни кровати. Пластиковые опоры столика служат одновременно ограничителями движения при расположении его на поручнях.

4.10 Центральный тормоз (для исполнения с колесами)

Кровать оснащается центральной тормозной системой колес с единой педалью регулировки. Рама тормозной системы устанавливается на месте опор с помощью прилагаемого крепежа.

Три (из четырех) колеса с двухпозиционной центральной тормозной системой (С2), которая блокирует колесо и поворотный узел+полная разблокировка. Одно (из четырех) колесо с трехпозиционной центральной тормозной системой (С3), которая блокирует колесо и поворотный узел, либо только поворотный узел, либо полная разблокировка. Управление тормозной системой происходит через кулачковый механизм в стержне фиксации диаметром 28 мм.

4.11 Крючок-держатель

Крючок – держатель навешивается на раму кровати и служит для размещения мочеприемника.

5 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

5.1 Общая информация

Очистка – это самое важное средство и требование для успешной химической дезинфекции. Когда кровать используется одним и тем же пациентом, рутинная очистка кровати весьма существенна для обеспечения гигиенической обстановки. Дезинфекция ходовой части необходима только в том случае, когда она видимо загрязнена инфекционными или потенциально инфекционными материалами (кровь, стул, гной) или, при инфекционной болезни, по указанию врача. Кровать должна быть протерта и продезинфицирована перед тем.

как ее займет новый пациент!

5.2 Инструкции по очистке и дезинфекции

- Снять постельное белье и отправить в прачечную.
- Прочистить все поверхности, включая реечную раму (ламели) кровати мягким экологически чистящим раствором.
- Если кровать загрязнена инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать ее протиркой агентами, одобренными СЭС и пригодными для соответствующих поверхностей. Дезинфекция колес должна производиться только в том случае, если они видимо загрязнены инфекционными или потенциально инфекционными материалами.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только в больницах, при наличии у пациента мультирезистентного патогенна.

Дезинфекция кровати непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистых» и «грязных» кроватей при их транспортировке. Это в свою очередь, предотвращает распространение внутрибольничных болезнетворных микроорганизмов, что может быть обеспечено следованием данным рекомендациям.

Неиспользуемая кровать должна быть отправлена на хранение в накрытом состоянии, для предохранения ее от загрязнения.

5.3 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы кровати следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуются протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.



внимание

- Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

5.3.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.
- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.
- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.
- После завершения дезинфекции провентилировать помещение.
- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление, при котором выделяются большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.
- Кроме того, протирка имеет более существенное значение.

5.4 Метод дезинфекции

Дезинфекцию проводят протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% универсального моющего средства, при температуре раствора не менее плюс 18 °C, два раза с интервалом между протираниями 10-15 минут.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 6 лет в зависимости от условий и частоты применения.



Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

С этой целью необходимо проводить регулярный осмотр кровати для обеспечения постоянной гарантии ее безопасности и проверки работоспособности, как описано ниже.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

Рекомендации:

Ежемесячная проверка всех механических компонентов.



В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требованием о техобслуживании или ремонте.

Таблица устранения неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Не работает центральный тормоз (для исполнения с колесами)	Неправильно нажата педаль	Нажать снова
	Недостаток смазки	Отсоединить и достать механизм, добавить смазку
	Поломка педали или колеса	Заменить колесо
Некоторые функции центрального тормоза не действуют	Некорректная установка шпильки	Переустановка шпильки
	Отсутствует шпилька	Замените шпильку и оси шарнира
Боковые ограждения не фиксируются в вертикальном положении	Неправильная установка	Действуйте согласно инструкции по установке
	Фиксирующее устройство повреждено	Заменить на новое
	Посторонний предмет препятствует фиксации	Удалите посторонний предмет

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Конструкция кровати должна обеспечивать удобное размещение на ней пользователей, а также обеспечение доступа к отдельным сборочным единицам и деталям, которые могут быть заменены в процессе эксплуатации и взаимозаменяемость этих изделий.

8.2 Несущие конструкции кровати должны изготавливаться замкнутого сечения. Накладные, декоративные элементы мебели закреплены неподвижно.

8.3 Кровать должна характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с её предназначением, и должна отвечать необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

8.4 Все сварные швы должны быть непрерывными и сплошными, на видимой поверхности кровати не допускаются дефекты сварных соединений.

8.5 Фурнитура, выходящая на поверхность кровати, должна быть без заусенцев.

8.6 Наружная поверхность кровати не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей.

8.7 Кровать должна выдерживать номинальную нагрузку 150 кг, равномерно распределенную на секции и не иметь после сильной нагрузки остаточной деформации.

8.8 Механическая прочность кровати должна быть не менее 300 кг.

8.9 Кровать может быть оснащена 4-мя колесами диаметром $125 \pm 0,5$ мм (или стоять на подпятниках). Все колеса должны быть самоориентирующимися и легко без заеданий проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна.

8.10 Кровать может быть оборудована центральным тормозом, обеспечивающим удержание кровати с пациентом в неподвижном состоянии.

8.11 Колеса не должны оставлять на полу помещения никаких отпечатков.

8.12 Усилие, прилагаемое к тормозному устройству колес, должно быть не более 100 Н.

8.13 Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки, приложенное к спинке в направлении движения вдоль плоскости пола, должно быть не более 100 Н.

8.14 Центральный тормоз, должен удерживать от перемещения кровать, с размещенной на ней номинальной нагрузкой, при приложении усилия до 300 Н.

8.15 Усилия, прилагаемые к рукояткам механизмов изменения углов наклона секций, с размещенной на них номинальной нагрузкой, не должны превышать 50 Н.

8.16 Секции кровати при заданных углах наклона должны надежно фиксироваться.

Самопроизвольное изменение углов наклона секций с размещенной на них номинальной нагрузкой не допускается.

8.17 Кровать может быть оснащена амортизаторами (бамперами), установленными на спинках, предохраняющими защитные покрытия кровати и стены помещений от ударов и повреждений.

8.18 Секции кроватей должны быть оснащены скобами, удерживающими матрац.

8.19 Кровати должны стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес (или одной из ножек) не должно быть более 3 мм.

8.20 Съёмные приспособления должны крепиться к кровати без применения специального инструмента. Усилия фиксации съёмных приспособлений – не более 100 Н.

8.21 При изготовлении кровати и её компонентов должна обеспечиваться точность, позволяющая осуществить сборку без дополнительных подгонок.

Габаритные размеры кровати и её масса должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Вид оборудования	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм		Угол наклона секции к гориз., угл. град.			Масса без доп. оборудования, не более, кг.	
			не подъемная	подъемная	спинной	тазобедренной	икроножной	не подъемная	подъемная
Кровать Rebq3	2230±5	1042±5	950±5	800±5÷1150±5	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°	65	88

Внутренний диаметр гнезда для установки вставного поручня - 30 ± 1 мм.

Внутренний диаметр гнезда для установки стойки для капельницы - 21 ± 1 мм.

Внутренний диаметр гнезда для установки стойки для подтягивания - 29 ± 1 мм.

Габаритные размеры кровати приведен в приложении 3.

8.22 Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кровати и её компонентов, после падения.

8.23 Механизмы подъема и опускания секций кроватей, а также подъема кровати должны быть расположены вне досягаемости от случайного касания пользователями или обслуживающим персоналом.

8.24 Управление механизмами подъема кровати и секций кровати должно осуществляться с помощью рукояток выведенных в правую или левую сторону кроватей или в ножную часть.

8.25 Расстояние между подвижными секциями и рамой ложементта должно быть не менее 10 мм и не более 15 мм. Расстояние между подвижными секциями должно быть не менее 20 мм и не более 50 мм.

8.26 Параметры поручней.

8.26.1 Габаритные размеры поручней приведены в приложении 4.

8.26.2 Масса поручней должна быть:

- поручень вставной не более 3 кг;
- поручень с деревянной вставкой не более 4,5 кг.
- складной поручень не более 3 кг.
- пластмассовый малый поручень не более 2 кг
- пластмассовый большой поручень не более 2,5 кг

8.26.3 Поручень должен выдерживать боковую нагрузку в верхней точке не менее 500 Н.

8.26.4 Установленный поручень должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 500 Н.

8.26.5 Безопасная нагрузка на складной механизм поручня должна быть не более 7 кг.

8.26.6 Безопасная нагрузка на фиксатор поручня должна быть не более 7 кг.

8.27 Параметры стойки для капельницы.

8.27.1 Габаритные размеры стоек для капельницы представлены в приложении 5.

8.27.2 Масса стойки для капельницы должна быть не более 3 кг.

8.27.3 Безопасная нагрузка на крючок должна быть не более 3 кг.

8.27.4 Количество крючков и держателей на стойках для капельниц должно быть:

- стойка для капельницы из нержавеющей стали: 2 складных крючка;
- стойка для капельницы из окрашенной стали: 4 держателя.

8.27.5 На стойках для капельницы из нержавеющей стали складные крючки для емкостей с инфузионными растворами должны закрепляться и регулироваться по высоте от 830 ± 5 мм до 1530 ± 5 мм при помощи винтовых зажимов. После закрепления крючки для инфузионных растворов не должны смещаться от усилия менее 10 даН.

8.27.6 На стойках для капельницы из окрашенной стали держатели для емкостей с инфузионными растворами должны закрепляться и регулироваться по высоте от 930 ± 5 мм до 1510 ± 5 мм при помощи винтовых зажимов. После закрепления крючки для инфузионных растворов не должны смещаться от усилия менее 10 даН.

8.28 Параметры стойки для подтягивания.

8.28.1 Габаритные размеры стойки для подтягивания приведены в приложении 6.

8.28.2 Масса стойки для подтягивания должна быть не более 3 кг.

8.28.3 Максимальная нагрузка на петлю должна быть 150 ± 10 кг.

8.28.4 Механическая прочность стойки для подтягивания должна быть 200 ± 20 кг.

8.28.5 Длина ремня должна регулироваться в интервале от 33 ± 2 до 93 ± 2 см.

8.29 Параметры лестницы для подтягивания.

8.29.1 Габаритные размеры лестницы для подтягивания приведены в приложении 7.

8.29.2 Кол-во перекладин должно быть 4 штуки.

8.29.3 Масса лестницы для подтягивания должна быть не более 1,5 кг.

8.29.4 Максимальная нагрузка на веревку должна быть 200 ± 10 кг.

8.29.5 Максимальная нагрузка на перекладину должна быть 200 ± 10 кг.

8.29.6 Механическая прочность перекладины должна быть 300 ± 20 кг.

8.30 Параметры полки.

8.30.1 Габаритные размеры полки приведены в приложении 8.

8.30.2 Масса полки должна быть не более 3 кг.

8.30.3 Максимальная нагрузка на полку должна быть не более 10 кг.

8.31 Параметры центрального тормоза.

8.31.1 Три (из четырех) колеса с двухпозиционной центральной тормозной системой (С2), которая блокирует колесо и поворотный узел+полная разблокировка.

8.31.2 Одно (из четырех) колес с трехпозиционной центральной тормозной системой (С3), которая блокирует колесо и поворотный узел, либо только поворотный узел, либо полная разблокировка

8.31.3 Управление тормозной системой через кулачковый механизм в стержне фиксации диаметром 28 мм.

8.31.4 Схема центрального тормоза приведена в приложении 9.

8.32 Параметры столика.

8.32.1 Габаритные размеры столика приведены в приложении 10.

8.32.2 Масса столика должна быть не более 4,5 кг.

8.32.3 Стол должен выдерживать полуторакратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 30 ± 1 кг.

8.33 Параметры крючка-держателя

8.33.1 Габаритные размеры крючка-держателя приведены в приложении 11.

8.33.2 Выдерживаемая нагрузка на крючок должна быть не более 10 кг.

8.33.3 Масса крючка-держателя не более 0,05 кг.

8.34 Параметры спинок

8.34.1 Габаритные размеры спинок приведены в приложении 12.

8.34.2 Масса спинок должна быть:

- спинка пластмассовая головная не более 3,5 кг
- спинка пластмассовая ножная не более 3,2 кг
- спинка металлическая не более 4,5 кг
- спинка металлическая с деревянной вставкой не более 5,5 кг.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Эксплуатация	Температура Влажность (без конденсации)	$+10^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$ 30%.....75%
Транспортировка и хранение	Температура Влажность (без конденсации)	$-50^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ 30%.....75%

10 ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-002-27127705-2019 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В гарантию не входят поломки, возникшие по причине ненадлежащей эксплуатации.

По вопросам гарантийного или текущего ремонта обращаться к: Обществу с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 14.201-83	Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
ГОСТ 9.032-74	Покрывтия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.104-79	Покрывтия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 9.302-88	Покрывтия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 9.303-84	Покрывтия металлические и неметаллические. Общие требования к выбору.
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ Р 51474-99	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1 общие требования
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности.
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы.

СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГОСТ 19120	Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний

13 МАРКИРОВКА

13.1 Маркировка


Каждое изделие маркируется табличкой, выполненным печатным способом, прочно приклеенным к изделию. Маркировка должна содержать:

- наименование изделия по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;
- дату изготовления;
- номер партии;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- обозначение ГОСТ 19917.

14 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Ресабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

15 ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

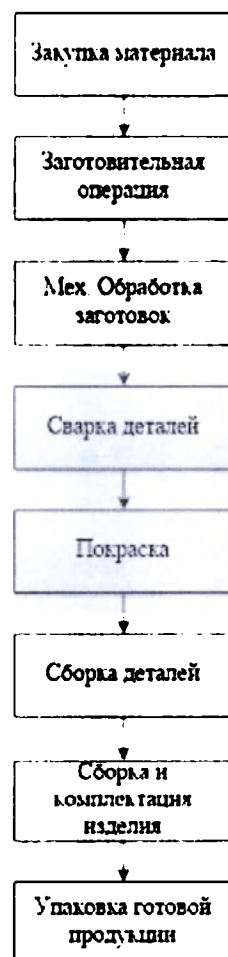

Приложение 1

I. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebq3 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-003-27127705-2019, варианты исполнений:

1. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-LB0000, Rebq3-LB00B0, Rebq3-LB00S0, Rebq3-LB0C00, Rebq3-LB0CB0, Rebq3-LB0CS0, Rebq3-LB0S00, Rebq3-LB0SB0, Rebq3-LB0SS0, Rebq3-LB1000, Rebq3-LB10B0, Rebq3-LB10S0, Rebq3-LB1S00, Rebq3-LB1SB0, Rebq3-LB1SS0, Rebq3-LB1C00, Rebq3-LB1CB0, Rebq3-LB1CS0, Rebq3-LW0000, Rebq3-LW00B0, Rebq3-LW00S0, Rebq3-LW0C00, Rebq3-LW0CB0, Rebq3-LW0CS0, Rebq3-LW0S00, Rebq3-LW0SB0, Rebq3-LW0SS0, Rebq3-LW1000, Rebq3-LW10B0, Rebq3-LW10S0, Rebq3-LW1S00, Rebq3-LW1SB0, Rebq3-LW1SS0, Rebq3-LW1C00, Rebq3-LW1CB0, Rebq3-LW1CS0.

2. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-NB0000, Rebq3-NB00B0, Rebq3-NB00S0, Rebq3-NB0C00, Rebq3-NB0CB0, Rebq3-NB0CS0, Rebq3-NB0S00, Rebq3-NB0SB0, Rebq3-NB0SS0, Rebq3-NB1000, Rebq3-NB10B0, Rebq3-NB10S0, Rebq3-NB1S00, Rebq3-NB1SB0, Rebq3-NB1SS0, Rebq3-NB1C00, Rebq3-NB1CB0, Rebq3-NB1CS0, Rebq3-NW0000, Rebq3-NW00B0, Rebq3-NW00S0, Rebq3-NW0C00, Rebq3-NW0CB0, Rebq3-NW0CS0, Rebq3-NW0S00, Rebq3-NW0SB0, Rebq3-NW0SS0, Rebq3-NW1000, Rebq3-NW10B0, Rebq3-NW10S0, Rebq3-NW1S00, Rebq3-NW1SB0, Rebq3-NW1SS0, Rebq3-NW1C00, Rebq3-NW1CB0, Rebq3-NW1CS0.

3. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-PB0000, Rebq3-PB00B0, Rebq3-PB00S0, Rebq3-PB0C00, Rebq3-PB0CB0, Rebq3-PB0CS0, Rebq3-PB0S00, Rebq3-PB0SB0, Rebq3-PB0SS0, Rebq3-PB1000, Rebq3-PB10B0, Rebq3-PB10S0, Rebq3-PB1S00, Rebq3-PB1SB0, Rebq3-PB1SS0, Rebq3-PB1C00, Rebq3-PB1CB0, Rebq3-PB1CS0, Rebq3-PW0000, Rebq3-PW00B0, Rebq3-PW00S0, Rebq3-PW0C00, Rebq3-PW0CB0, Rebq3-PW0CS0, Rebq3-PW0S00, Rebq3-PW0SB0, Rebq3-PW0SS0, Rebq3-PW1000, Rebq3-PW10B0, Rebq3-PW10S0, Rebq3-PW1S00, Rebq3-PW1SB0, Rebq3-PW1SS0, Rebq3-PW1C00, Rebq3-PW1CB0, Rebq3-PW1CS0.

4. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-HB0000, Rebq3-HB00B0, Rebq3-HB00S0, Rebq3-HB0C00, Rebq3-HB0CB0, Rebq3-HB0CS0, Rebq3-HB0S00, Rebq3-HB0SB0, Rebq3-HB0SS0, Rebq3-HB1000, Rebq3-HB10B0, Rebq3-HB10S0, Rebq3-HB1S00, Rebq3-HB1SB0, Rebq3-HB1SS0, Rebq3-HB1C00, Rebq3-HB1CB0, Rebq3-HB1CS0, Rebq3-HW0000, Rebq3-HW00B0, Rebq3-HW00S0, Rebq3-HW0C00, Rebq3-HW0CB0, Rebq3-HW0CS0, Rebq3-HW0S00, Rebq3-HW0SB0, Rebq3-HW0SS0, Rebq3-HW1000, Rebq3-HW10B0, Rebq3-HW10S0, Rebq3-HW1S00, Rebq3-HW1SB0, Rebq3-HW1SS0, Rebq3-HW1C00, Rebq3-HW1CB0, Rebq3-HW1CS0.

5. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со

стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-LB000L, Rebq3-LB00BL, Rebq3-LB00SL, Rebq3-LB0C0L, Rebq3-LB0CBL, Rebq3-LB0CSL, Rebq3-LB0S0L, Rebq3-LB0SBL, Rebq3-LB0SSL, Rebq3-LB100L, Rebq3-LB10BL, Rebq3-LB10SL, Rebq3-LB1S0L, Rebq3-LB1SBL, Rebq3-LB1SSL, Rebq3-LB1C0L, Rebq3-LB1CBL, Rebq3-LB1CSL, Rebq3-LW000L, Rebq3-LW00BL, Rebq3-LW00SL, Rebq3-LW0C0L, Rebq3-LW0CBL, Rebq3-LW0CSL, Rebq3-LW0S0L, Rebq3-LW0SBL, Rebq3-LW0SSL, Rebq3-LW100L, Rebq3-LW10BL, Rebq3-LW10SL, Rebq3-LW1S0L, Rebq3-LW1SBL, Rebq3-LW1SSL, Rebq3-LW1C0L, Rebq3-LW1CBL, Rebq3-LW1CSL.

6. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-NB000L, Rebq3-NB00BL, Rebq3-NB00SL, Rebq3-NB0C0L, Rebq3-NB0CBL, Rebq3-NB0CSL, Rebq3-NB0S0L, Rebq3-NB0SBL, Rebq3-NB0SSL, Rebq3-NB100L, Rebq3-NB10BL, Rebq3-NB10SL, Rebq3-NB1S0L, Rebq3-NB1SBL, Rebq3-NB1SSL, Rebq3-NB1C0L, Rebq3-NB1CBL, Rebq3-NB1CSL, Rebq3-NW000L, Rebq3-NW00BL, Rebq3-NW00SL, Rebq3-NW0C0L, Rebq3-NW0CBL, Rebq3-NW0CSL, Rebq3-NW0S0L, Rebq3-NW0SBL, Rebq3-NW0SSL, Rebq3-NW100L, Rebq3-NW10BL, Rebq3-NW10SL, Rebq3-NW1S0L, Rebq3-NW1SBL, Rebq3-NW1SSL, Rebq3-NW1C0L, Rebq3-NW1CBL, Rebq3-NW1CSL.

7. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-PB000L, Rebq3-PB00BL, Rebq3-PB00SL, Rebq3-PB0C0L, Rebq3-PB0CBL, Rebq3-PB0CSL, Rebq3-PB0S0L, Rebq3-PB0SBL, Rebq3-PB0SSL, Rebq3-PB100L, Rebq3-PB10BL, Rebq3-PB10SL, Rebq3-PB1S0L, Rebq3-PB1SBL, Rebq3-PB1SSL, Rebq3-PB1C0L, Rebq3-PB1CBL, Rebq3-PB1CSL, Rebq3-PW000L, Rebq3-PW00BL, Rebq3-PW00SL, Rebq3-PW0C0L, Rebq3-PW0CBL, Rebq3-PW0CSL, Rebq3-PW0S0L, Rebq3-PW0SBL, Rebq3-PW0SSL, Rebq3-PW100L, Rebq3-PW10BL, Rebq3-PW10SL, Rebq3-PW1S0L, Rebq3-PW1SBL, Rebq3-PW1SSL, Rebq3-PW1C0L, Rebq3-PW1CBL, Rebq3-PW1CSL.

8. Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа, в составе: колёса или подпятники; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq3-HB000L, Rebq3-HB00BL, Rebq3-HB00SL, Rebq3-HB0C0L, Rebq3-HB0CBL, Rebq3-HB0CSL, Rebq3-HB0S0L, Rebq3-HB0SBL, Rebq3-HB0SSL, Rebq3-HB100L, Rebq3-HB10BL, Rebq3-HB10SL, Rebq3-HB1S0L, Rebq3-HB1SBL, Rebq3-HB1SSL, Rebq3-HB1C0L, Rebq3-HB1CBL, Rebq3-HB1CSL, Rebq3-HW000L, Rebq3-HW00BL, Rebq3-HW00SL, Rebq3-HW0C0L, Rebq3-HW0CBL, Rebq3-HW0CSL, Rebq3-HW0S0L, Rebq3-HW0SBL, Rebq3-HW0SSL, Rebq3-HW100L, Rebq3-HW10BL, Rebq3-HW10SL, Rebq3-HW1S0L, Rebq3-HW1SBL, Rebq3-HW1SSL, Rebq3-HW1C0L, Rebq3-HW1CBL, Rebq3-HW1CSL.

II. Принадлежности:

1. Полка;
2. Центральный тормоз;
3. Столик пластиковый;
4. Столик деревянный;
5. Крючок-держатель.

Приложение 2
Комплект поставки

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт
I	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebq3 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-003-27127705-2019, варианты исполнений:	
1.	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0000, в составе:	
1.1	Подпятник	4
1.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
2.	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB00B0, в составе:	
2.1	Подпятник	4
2.2	Устройство для подтягивания	1
2.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
3.	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB00S0, в составе:	
3.1	Подпятник	4
3.2	Лестница для подтягивания	1
3.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
4	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0C00, в составе:	
4.1	Подпятник	4
4.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
4.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
5	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0CB0, в составе:	
5.1	Подпятник	4
5.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
5.3	Устройство для подтягивания	1
5.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
6	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0CS0, в составе:	
6.1	Подпятник	4
6.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
6.3	Лестница для подтягивания	1
6.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
7	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0S00, в составе:	
7.1	Подпятник	4
7.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
7.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
8	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0SB0, в составе:	
8.1	Подпятник	4
8.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
8.3	Устройство для подтягивания	1
8.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
9	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0SS0, в составе:	
9.1	Подпятник	4
9.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
9.3	Лестница для подтягивания	1
9.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
10	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1000, в составе:	
10.1	Подпятник	4
10.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
10.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
11	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB10B0, в составе:	
11.1	Подпятник	4
11.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
11.3	Устройство для подтягивания	1
11.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
12	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB10S0, в составе:	
12.1	Подпятник	4
12.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
12.3	Лестница для подтягивания	1
12.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
13	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1S00, в составе:	
13.1	Подпятник	4
13.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
13.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
13.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
14	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1SB0, в составе:	
14.1	Подпятник	4
14.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
14.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
14.4	Устройство для подтягивания	1

14.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
15	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1SS0, в составе:	
15.1	Подпятник	4
15.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
15.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
15.4	Лестница для подтягивания	1
15.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
16	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1C00, в составе:	
16.1	Подпятник	4
16.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
16.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
16.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
17	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1CB0, в составе:	
17.1	Подпятник	4
17.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
17.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
17.4	Устройство для подтягивания	1
17.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
18	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1CS0, в составе:	
18.1	Подпятник	4
18.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
18.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
18.4	Лестница для подтягивания	1
18.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
19	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0000, в составе:	
19.1	Колеса	4
19.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
20	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW00B0, в составе:	
20.1	Колеса	4
20.2	Устройство для подтягивания	1
20.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
21	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW00S0, в составе:	
21.1	Колеса	4

21.2	Лестница для подтягивания	1
21.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
22	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0C00, в составе:	
22.1	Колеса	4
22.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
22.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
23	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0CB0, в составе:	
23.1	Колеса	4
23.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
23.3	Устройство для подтягивания	1
23.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
24	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0CS0, в составе:	
24.1	Колеса	4
24.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
24.3	Лестница для подтягивания	1
24.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
25	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0S00, в составе:	
25.1	Колеса	4
25.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
25.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
26	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0SB0, в составе:	
26.1	Колеса	4
26.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
26.3	Устройство для подтягивания	1
26.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
27	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0SS0, в составе:	
27.1	Колеса	4
27.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
27.3	Лестница для подтягивания	1
27.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
28	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1000, в составе:	
28.1	Колеса	4
28.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
28.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
29	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW10B0, в составе:	
29.1	Колеса	4
29.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
29.3	Устройство для подтягивания	1
29.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
30	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW10S0, в составе:	
30.1	Колеса	4
30.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
30.3	Лестница для подтягивания	1
30.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
31	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW1S00, в составе:	
31.1	Колеса	4
31.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
31.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
31.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
32	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW1SB0, в составе:	
32.1	Колеса	4
32.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
32.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
32.4	Устройство для подтягивания	1
32.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
33	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW1SS0, в составе:	
33.1	Колеса	4
33.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
33.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
33.4	Лестница для подтягивания	1
33.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
34	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW1C00, в составе:	
34.1	Колеса	4
34.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
34.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
34.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
35	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebg3-LW1CB0, в составе:	

35.1	Колеса	4
35.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
35.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
35.4	Устройство для подтягивания	1
35.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
36	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1CS0, в составе:	
36.1	Колеса	4
36.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
36.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
36.4	Лестница для подтягивания	1
36.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
37	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0000, в составе:	
37.1	Подпятник	4
37.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
38	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00B0, в составе:	
38.1	Подпятник	4
38.2	Устройство для подтягивания	1
38.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
39	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00S0, в составе:	
39.1	Подпятник	4
39.2	Лестница для подтягивания	1
39.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
40	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00C00, в составе:	
40.1	Подпятник	4
40.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
40.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
41	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00CB0, в составе:	
41.1	Подпятник	4
41.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
41.3	Устройство для подтягивания	1
41.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
42	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00CS0, в составе:	
42.1	Подпятник	4
42.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
42.3	Лестница для подтягивания	1

42.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
43	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0S00, в составе:	
43.1	Подпятник	4
43.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
43.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
44	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0SB0, в составе:	
44.1	Подпятник	4
44.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
44.3	Устройство для подтягивания	1
44.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
45	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0SS0, в составе:	
45.1	Подпятник	4
45.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
45.3	Лестница для подтягивания	1
45.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
46	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1000, в составе:	
46.1	Подпятник	4
46.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
46.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
47	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB10B0, в составе:	
47.1	Подпятник	4
47.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
47.3	Устройство для подтягивания	1
47.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
48	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB10S0, в составе:	
48.1	Подпятник	4
48.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
48.3	Лестница для подтягивания	1
48.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
49	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1S00, в составе:	
49.1	Подпятник	4
49.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
49.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1

49.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
50	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1SB0, в составе:	
50.1	Подпятник	4
50.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
50.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
50.4	Устройство для подтягивания	1
50.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
51	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1SS0, в составе:	
51.1	Подпятник	4
51.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
51.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
51.4	Лестница для подтягивания	1
51.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
52	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1C00, в составе:	
52.1	Подпятник	4
52.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
52.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
52.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
53	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1CB0, в составе:	
53.1	Подпятник	4
53.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
53.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
53.4	Устройство для подтягивания	1
53.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
54	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1CS0, в составе:	
54.1	Подпятник	4
54.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
54.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
54.4	Лестница для подтягивания	1
54.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
55	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0000, в составе:	
55.1	Колеса	4
55.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
56	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW00B0, в составе:	
56.1	Колеса	4
56.2	Устройство для подтягивания	1
56.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
57	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW00S0, в составе:	
57.1	Колеса	4
57.2	Лестница для подтягивания	1
57.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
58	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0C00, в составе:	
58.1	Колеса	4
58.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
58.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
59	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0CB0, в составе:	
59.1	Колеса	4
59.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
59.3	Устройство для подтягивания	1
59.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
60	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0CS0, в составе:	
60.1	Колеса	4
60.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
60.3	Лестница для подтягивания	1
60.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
61	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0S00, в составе:	
61.1	Колеса	4
61.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
61.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
62	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0SB0, в составе:	
62.1	Колеса	4
62.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
62.3	Устройство для подтягивания	1
62.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
63	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0SS0, в составе:	
63.1	Колеса	4
63.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
63.3	Лестница для подтягивания	1
63.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
64	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1000, в составе:	
64.1	Колеса	4
64.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
64.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
65	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW10B0, в составе:	
65.1	Колеса	4
65.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
65.3	Устройство для подтягивания	1
65.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
66	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW10S0, в составе:	
66.1	Колеса	4
66.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
66.3	Лестница для подтягивания	1
66.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
67	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1S00, в составе:	
67.1	Колеса	4
67.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
67.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
67.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
68	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1SB0, в составе:	
68.1	Колеса	4
68.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
68.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
68.4	Устройство для подтягивания	1
68.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
69	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1SS0, в составе:	
69.1	Колеса	4
69.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
69.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
69.4	Лестница для подтягивания	1
69.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
70	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-	

	NW1C00, в составе:	
70.1	Колеса	4
70.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
70.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
70.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
71	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1CB0, в составе:	
71.1	Колеса	4
71.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
71.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
71.4	Устройство для подтягивания	1
71.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
72	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1CS0, в составе:	
72.1	Колеса	4
72.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
72.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
72.4	Лестница для подтягивания	1
72.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
73	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0000, в составе:	
73.1	Подпятник	4
73.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
74	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB00B0, в составе:	
74.1	Подпятник	4
74.2	Устройство для подтягивания	1
74.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
75	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB00S0, в составе:	
75.1	Подпятник	4
75.2	Лестница для подтягивания	1
75.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
76	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0C00, в составе:	
76.1	Подпятник	4
76.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
76.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
77	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0CB0, в составе:	
77.1	Подпятник	4

77.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
77.3	Устройство для подтягивания	1
77.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
78	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0CS0, в составе:	
78.1	Подпятник	4
78.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
78.3	Лестница для подтягивания	1
78.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
79	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0S00, в составе:	
79.1	Подпятник	4
79.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
79.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
80	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0SB0, в составе:	
80.1	Подпятник	4
80.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
80.3	Устройство для подтягивания	1
80.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
81	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB0SS0, в составе:	
81.1	Подпятник	4
81.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
81.3	Лестница для подтягивания	1
81.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
82	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1000, в составе:	
82.1	Подпятник	4
82.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
82.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
83	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB10B0, в составе:	
83.1	Подпятник	4
83.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
83.3	Устройство для подтягивания	1
83.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
84	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB10S0, в составе:	
84.1	Подпятник	4
84.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

84.3	Лестница для подтягивания	1
84.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
85	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1S00, в составе:	
85.1	Подпятник	4
85.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
85.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
85.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
86	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1SB0, в составе:	
86.1	Подпятник	4
86.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
86.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
86.4	Устройство для подтягивания	1
86.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
87	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1SS0, в составе:	
87.1	Подпятник	4
87.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
87.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
87.4	Лестница для подтягивания	1
87.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
88	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1C00, в составе:	
88.1	Подпятник	4
88.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
88.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
88.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
89	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1CB0, в составе:	
89.1	Подпятник	4
89.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
89.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
89.4	Устройство для подтягивания	1
89.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
90	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PB1CS0, в составе:	
90.1	Подпятник	4
90.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
90.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1

90.4	Лестница для подтягивания	1
90.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
91	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0000, в составе:	
91.1	Колеса	4
91.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
92	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW00B0, в составе:	
92.1	Колеса	4
92.2	Устройство для подтягивания	1
92.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
93	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW00S0, в составе:	
93.1	Колеса	4
93.2	Лестница для подтягивания	1
93.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
94	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0C00, в составе:	
94.1	Колеса	4
94.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
94.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
95	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0CB0, в составе:	
95.1	Колеса	4
95.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
95.3	Устройство для подтягивания	1
95.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
96	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0CS0, в составе:	
96.1	Колеса	4
96.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
96.3	Лестница для подтягивания	1
96.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
97	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0S00, в составе:	
97.1	Колеса	4
97.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
97.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
98	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0SB0, в составе:	
98.1	Колеса	4
98.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1

98.3	Устройство для подтягивания	1
98.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
99	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW0SS0, в составе:	
99.1	Колеса	4
99.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
99.3	Лестница для подтягивания	1
99.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
100	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1000, в составе:	
100.1	Колеса	4
100.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
100.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
101	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW10B0, в составе:	
101.1	Колеса	4
101.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
101.3	Устройство для подтягивания	1
101.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
102	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW10S0, в составе:	
102.1	Колеса	4
102.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
102.3	Лестница для подтягивания	1
102.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
103	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1S00, в составе:	
103.1	Колеса	4
103.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
103.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
103.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
104	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1SB0, в составе:	
104.1	Колеса	4
104.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
104.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
104.4	Устройство для подтягивания	1
104.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
105	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1SS0,	

	в составе:	
105.1	Колеса	4
105.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
105.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
105.4	Лестница для подтягивания	1
105.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
106	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1C00, в составе:	
106.1	Колеса	4
106.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
106.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
106.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
107	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1CB0, в составе:	
107.1	Колеса	4
107.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
107.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
107.4	Устройство для подтягивания	1
107.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
108	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из пластика Rebq3-PW1CS0, в составе:	
108.1	Колеса	4
108.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
108.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
108.4	Лестница для подтягивания	1
108.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
109	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0000, в составе:	
109.1	Подпятник	4
109.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
110	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB00B0, в составе:	
110.1	Подпятник	4
110.2	Устройство для подтягивания	1
110.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
111	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB00S0, в составе:	
111.1	Подпятник	4
111.2	Лестница для подтягивания	1
111.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
112	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0C00, в составе:	
112.1	Подпятник	4
112.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
112.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
113	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0CB0, в составе:	
113.1	Подпятник	4
113.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
113.3	Устройство для подтягивания	1
113.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
114	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0CS0, в составе:	
114.1	Подпятник	4
114.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
114.3	Лестница для подтягивания	1
114.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
115	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0S00, в составе:	
115.1	Подпятник	4
115.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
115.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
116	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0SB0, в составе:	
116.1	Подпятник	4
116.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
116.3	Устройство для подтягивания	1
116.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
117	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0SS0, в составе:	
117.1	Подпятник	4
117.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
117.3	Лестница для подтягивания	1
117.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
118	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1000, в составе:	
118.1	Подпятник	4
118.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
118.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
119	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB10B0, в составе:	
119.1	Подпятник	4
119.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень	2

	или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	
119.3	Устройство для подтягивания	1
119.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
120	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB10S0, в составе:	
120.1	Подпятник	4
120.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
120.3	Лестница для подтягивания	1
120.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
121	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1S00, в составе:	
121.1	Подпятник	4
121.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
121.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
121.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
122	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1SB0, в составе:	
122.1	Подпятник	4
122.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
122.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
122.4	Устройство для подтягивания	1
122.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
123	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1SS0, в составе:	
123.1	Подпятник	4
123.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
123.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
123.4	Лестница для подтягивания	1
123.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
124	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1C00, в составе:	
124.1	Подпятник	4
124.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
124.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
124.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
125	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1CB0, в составе:	
125.1	Подпятник	4
125.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
125.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1

125.4	Устройство для подтягивания	1
125.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
126	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1CS0, в составе:	
126.1	Подпятник	4
126.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
126.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
126.4	Лестница для подтягивания	1
126.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
127	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW0000, в составе:	
127.1	Колеса	4
127.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
128	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00B0, в составе:	
128.1	Колеса	4
128.2	Устройство для подтягивания	1
128.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
129	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00S0, в составе:	
129.1	Колеса	4
129.2	Лестница для подтягивания	1
129.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
130	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW0C00, в составе:	
130.1	Колеса	4
130.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
130.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
131	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW0CB0, в составе:	
131.1	Колеса	4
131.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
131.3	Устройство для подтягивания	1
131.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
132	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW0CS0, в составе:	
132.1	Колеса	4
132.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
132.3	Лестница для подтягивания	1
132.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
133	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного	

	стального листа Rebq3-HW0S00, в составе:	
133.1	Колеса	4
133.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
133.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
134	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW0SB0, в составе:	
134.1	Колеса	4
134.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
134.3	Устройство для подтягивания	1
134.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
135	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW0SS0, в составе:	
135.1	Колеса	4
135.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
135.3	Лестница для подтягивания	1
135.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
136	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1000, в составе:	
136.1	Колеса	4
136.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
136.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
137	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW10B0, в составе:	
137.1	Колеса	4
137.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
137.3	Устройство для подтягивания	1
137.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
138	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW10S0, в составе:	
138.1	Колеса	4
138.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
138.3	Лестница для подтягивания	1
138.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
139	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1S00, в составе:	
139.1	Колеса	4
139.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
139.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
139.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
140	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного	

	стального листа Rebq3-HW1SB0, в составе:	
140.1	Колеса	4
140.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
140.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
140.4	Устройство для подтягивания	1
140.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
141	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1SS0, в составе:	
141.1	Колеса	4
141.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
141.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
141.4	Лестница для подтягивания	1
141.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
142	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1C00, в составе:	
142.1	Колеса	4
142.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
142.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
142.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
143	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1CB0, в составе:	
143.1	Колеса	4
143.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
143.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
143.4	Устройство для подтягивания	1
143.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
144	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1CS0, в составе:	
144.1	Колеса	4
144.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
144.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
144.4	Лестница для подтягивания	1
144.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
145	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB000L, в составе:	
145.1	Подпятник	4
145.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
146	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB00BL, в составе:	
146.1	Подпятник	4
146.2	Устройство для подтягивания	1

146.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
147	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB00SL, в составе:	
147.1	Подпятник	4
147.2	Лестница для подтягивания	1
147.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
148	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0C0L, в составе:	
148.1	Подпятник	4
148.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
148.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
149	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0CBL, в составе:	
149.1	Подпятник	4
149.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
149.3	Устройство для подтягивания	1
149.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
150	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0CSL, в составе:	
150.1	Подпятник	4
150.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
150.3	Лестница для подтягивания	1
150.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
151	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0S0L, в составе:	
151.1	Подпятник	4
151.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
151.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
152	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0SBL, в составе:	
152.1	Подпятник	4
152.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
152.3	Устройство для подтягивания	1
152.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
153	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB0SSL, в составе:	
153.1	Подпятник	4
153.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
153.3	Лестница для подтягивания	1
153.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
154	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB100L, в составе:	

154.1	Подпятник	4
154.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
154.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	1
155	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB10BL, в составе:	
155.1	Подпятник	4
155.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
155.3	Устройство для подтягивания	1
155.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
156	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB10SL, в составе:	
156.1	Подпятник	4
156.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
156.3	Лестница для подтягивания	1
156.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
157	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1S0L, в составе:	
157.1	Подпятник	4
157.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
157.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
157.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
158	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1SBL, в составе:	
158.1	Подпятник	4
158.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
158.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
158.4	Устройство для подтягивания	1
158.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
159	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1SSL, в составе:	
159.1	Подпятник	4
159.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
159.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
159.4	Лестница для подтягивания	1
159.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
160	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1C0L, в составе:	
160.1	Подпятник	4
160.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

160.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
160.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
161	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1CBL, в составе:	
161.1	Подпятник	4
161.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
161.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
161.4	Устройство для подтягивания	1
161.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
162	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LB1CSL, в составе:	
162.1	Подпятник	4
162.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
162.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
162.4	Лестница для подтягивания	1
162.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
163	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW000L, в составе:	
163.1	Колеса	4
163.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
164	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW00BL, в составе:	
164.1	Колеса	4
164.2	Устройство для подтягивания	1
164.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
165	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW00SL, в составе:	
165.1	Колеса	4
165.2	Лестница для подтягивания	1
165.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
166	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0C0L, в составе:	
166.1	Колеса	4
166.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
166.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
167	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0CBL, в составе:	
167.1	Колеса	4
167.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
167.3	Устройство для подтягивания	1
167.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

168	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0CSL, в составе:	
168.1	Колеса	4
168.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
168.3	Лестница для подтягивания	1
168.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
169	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0SOL, в составе:	
169.1	Колеса	4
169.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
169.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
170	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0SBL, в составе:	
170.1	Колеса	4
170.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
170.3	Устройство для подтягивания	1
170.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
171	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW0SSL, в составе:	
171.1	Колеса	4
171.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
171.3	Лестница для подтягивания	1
171.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
172	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW100L, в составе:	
172.1	Колеса	4
172.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
172.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
173	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW10BL, в составе:	
173.1	Колеса	4
173.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
173.3	Устройство для подтягивания	1
173.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
174	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW10SL, в составе:	
174.1	Колеса	4
174.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
174.3	Лестница для подтягивания	1
174.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
175	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1S0L, в составе:	
175.1	Колеса	4
175.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
175.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
175.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
176	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1SBL, в составе:	
176.1	Колеса	4
176.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
176.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
176.4	Устройство для подтягивания	1
176.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
177	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1SSL, в составе:	
177.1	Колеса	4
177.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
177.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
177.4	Лестница для подтягивания	1
177.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
178	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1C0L, в составе:	
178.1	Колеса	4
178.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
178.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
178.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
179	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1CBL, в составе:	
179.1	Колеса	4
179.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
179.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
179.4	Устройство для подтягивания	1
179.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
180	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальных ламелей Rebq3-LW1CSL, в составе:	
180.1	Колеса	4
180.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
180.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
180.4	Лестница для подтягивания	1
180.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
181	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB000L, в составе:	
181.1	Подпятник	4
181.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
182	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00BL, в составе:	
182.1	Подпятник	4
182.2	Устройство для подтягивания	1
182.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
183	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB00SL, в составе:	
183.1	Подпятник	4
183.2	Лестница для подтягивания	1
183.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
184	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0C0L, в составе:	
184.1	Подпятник	4
184.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
184.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
185	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0CBL, в составе:	
185.1	Подпятник	4
185.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
185.3	Устройство для подтягивания	1
185.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
186	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0CSL, в составе:	
186.1	Подпятник	4
186.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
186.3	Лестница для подтягивания	1
186.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
187	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0S0L, в составе:	
187.1	Подпятник	4
187.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
187.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
188	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0SBL, в составе:	
188.1	Подпятник	4
188.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
188.3	Устройство для подтягивания	1
188.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
189	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB0SSL, в составе:	
189.1	Подпятник	4
189.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
189.3	Лестница для подтягивания	1
189.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
190	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB100L, в составе:	
190.1	Подпятник	4
190.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
190.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
191	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB10BL, в составе:	
191.1	Подпятник	4
191.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
191.3	Устройство для подтягивания	1
191.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
192	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB10SL, в составе:	
192.1	Подпятник	4
192.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
192.3	Лестница для подтягивания	1
192.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	1
193	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1S0L, в составе:	
193.1	Подпятник	4
193.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
193.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
193.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
194	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1SBL, в составе:	
194.1	Подпятник	4
194.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
194.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
194.4	Устройство для подтягивания	1
194.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
195	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NB1SSL, в составе:	
195.1	Подпятник	4
195.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

195.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
195.4	Лестница для подтягивания	1
195.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
196	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NB1C0L, в составе:	
196.1	Подпятник	4
196.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
196.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
196.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
197	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NB1CBL, в составе:	
197.1	Подпятник	4
197.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
197.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
197.4	Устройство для подтягивания	1
197.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
198	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NB1CSL, в составе:	
198.1	Подпятник	4
198.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
198.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
198.4	Лестница для подтягивания	1
198.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
199	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NW000L, в составе:	
199.1	Колеса	4
199.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
200	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NW00BL, в составе:	
200.1	Колеса	4
200.2	Устройство для подтягивания	1
200.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
201	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NW00SL, в составе:	
201.1	Колеса	4
201.2	Лестница для подтягивания	1
201.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
202	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebg3-NW0C0L, в составе:	
202.1	Колеса	4
202.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1

202.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
203	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0CBL, в составе:	
203.1	Колеса	4
203.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
203.3	Устройство для подтягивания	1
203.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
204	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0CSL, в составе:	
204.1	Колеса	4
204.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
204.3	Лестница для подтягивания	1
204.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
205	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0S0L, в составе:	
205.1	Колеса	4
205.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
205.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
206	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0SBL, в составе:	
206.1	Колеса	4
206.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
206.3	Устройство для подтягивания	1
206.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
207	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW0SSL, в составе:	
207.1	Колеса	4
207.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
207.3	Лестница для подтягивания	1
207.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
208	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW100L, в составе:	
208.1	Колеса	4
208.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
208.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
209	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW10BL, в составе:	
209.1	Колеса	4
209.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
209.3	Устройство для подтягивания	1
209.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

210	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW10SL, в составе:	
210.1	Колеса	4
210.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
210.3	Лестница для подтягивания	1
210.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
211	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1S0L, в составе:	
211.1	Колеса	4
211.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
211.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
211.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
212	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1SBL, в составе:	
212.1	Колеса	4
212.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
212.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
212.4	Устройство для подтягивания	1
212.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
213	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1SSL, в составе:	
213.1	Колеса	4
213.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
213.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
213.4	Лестница для подтягивания	1
213.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
214	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1C0L, в составе:	
214.1	Колеса	4
214.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
214.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
214.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
215	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1CBL, в составе:	
215.1	Колеса	4
215.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
215.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
215.4	Устройство для подтягивания	1
215.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
216	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из стальной сетки Rebq3-NW1CSL, в составе:	
216.1	Колеса	4
216.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
216.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
216.4	Лестница для подтягивания	1
216.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
217	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB000L, в составе:	
217.1	Подпятник	4
217.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
218	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB00BL, в составе:	
218.1	Подпятник	4
218.2	Устройство для подтягивания	1
218.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
219	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB00SL, в составе:	
219.1	Подпятник	4
219.2	Лестница для подтягивания	1
219.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
220	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB0C0L, в составе:	
220.1	Подпятник	4
220.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
220.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
221	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB0CBL, в составе:	
221.1	Подпятник	4
221.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
221.3	Устройство для подтягивания	1
221.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
222	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB0CSL, в составе:	
222.1	Подпятник	4
222.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
222.3	Лестница для подтягивания	1
222.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
223	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB0S0L, в составе:	
223.1	Подпятник	4
223.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
223.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
224	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB0SBL, в составе:	
224.1	Подпятник	4
224.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
224.3	Устройство для подтягивания	1
224.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
225	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB0SSL, в составе:	
225.1	Подпятник	4
225.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
225.3	Лестница для подтягивания	1
225.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
226	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB100L, в составе:	
226.1	Подпятник	4
226.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
226.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
227	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB10BL, в составе:	
227.1	Подпятник	4
227.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
227.3	Устройство для подтягивания	1
227.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
228	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB10SL, в составе:	
228.1	Подпятник	4
228.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
228.3	Лестница для подтягивания	1
228.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
229	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB1S0L, в составе:	
229.1	Подпятник	4
229.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
229.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
229.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
230	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB1SBL, в составе:	
230.1	Подпятник	4
230.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

230.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
230.4	Устройство для подтягивания	1
230.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
231	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB1SSL, в составе:	
231.1	Подпятник	4
231.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
231.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
231.4	Лестница для подтягивания	1
231.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
232	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB1C0L, в составе:	
232.1	Подпятник	4
232.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
232.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
232.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
233	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB1CBL, в составе:	
233.1	Подпятник	4
233.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
233.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
233.4	Устройство для подтягивания	1
233.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
234	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PB1CSL, в составе:	
234.1	Подпятник	4
234.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
234.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
234.4	Лестница для подтягивания	1
234.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
235	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW000L, в составе:	
235.1	Колеса	4
235.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
236	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW00BL, в составе:	
236.1	Колеса	4
236.2	Устройство для подтягивания	1
236.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
237	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика	

	Rebq3-PW00SL, в составе:	
237.1	Колеса	4
237.2	Лестница для подтягивания	1
237.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
238	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW0C0L, в составе:	
238.1	Колеса	4
238.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
238.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
239	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW0CBL, в составе:	
239.1	Колеса	4
239.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
239.3	Устройство для подтягивания	1
239.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
240	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW0CSL, в составе:	
240.1	Колеса	4
240.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
240.3	Лестница для подтягивания	1
240.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
241	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW0S0L, в составе:	
241.1	Колеса	4
241.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
241.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
242	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW0SBL, в составе:	
242.1	Колеса	4
242.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
242.3	Устройство для подтягивания	1
242.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
243	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW0SSL, в составе:	
243.1	Колеса	4
243.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
243.3	Лестница для подтягивания	1
243.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
244	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW100L, в составе:	
244.1	Колеса	4
244.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
244.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
245	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW10BL, в составе:	
245.1	Колеса	4
245.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
245.3	Устройство для подтягивания	1
245.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
246	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW10SL, в составе:	
246.1	Колеса	4
246.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
246.3	Лестница для подтягивания	1
246.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
247	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW150L, в составе:	
247.1	Колеса	4
247.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
247.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
247.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
248	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW15BL, в составе:	
248.1	Колеса	4
248.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
248.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
248.4	Устройство для подтягивания	1
248.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
249	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW15SL, в составе:	
249.1	Колеса	4
249.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
249.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
249.4	Лестница для подтягивания	1
249.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
250	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW1C0L, в составе:	
250.1	Колеса	4
250.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
250.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1
250.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
251	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной,	

	тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW1CBL, в составе:	
251.1	Колеса	4
251.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
251.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
251.4	Устройство для подтягивания	1
251.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
252	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из пластика Rebq3-PW1CSL, в составе:	
252.1	Колеса	4
252.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
252.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
252.4	Лестница для подтягивания	1
252.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
253	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB000L, в составе:	
253.1	Подпятник	4
253.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
254	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB00BL, в составе:	
254.1	Подпятник	4
254.2	Устройство для подтягивания	1
254.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
255	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB00SL, в составе:	
255.1	Подпятник	4
255.2	Лестница для подтягивания	1
255.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
256	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0C0L, в составе:	
256.1	Подпятник	4
256.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
256.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
257	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0CBL, в составе:	
257.1	Подпятник	4
257.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
257.3	Устройство для подтягивания	1
257.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
258	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0CSL, в составе:	
258.1	Подпятник	4

258.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
258.3	Лестница для подтягивания	1
258.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
259	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0S0L, в составе:	
259.1	Подпятник	4
259.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали со складными крючками или не складными крючками	1
259.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
260	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0SBL, в составе:	
260.1	Подпятник	4
260.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
260.3	Устройство для подтягивания	1
260.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
261	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB0SSL, в составе:	
261.1	Подпятник	4
261.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
261.3	Лестница для подтягивания	1
261.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
262	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB100L, в составе:	
262.1	Подпятник	4
262.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
262.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
263	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB10BL, в составе:	
263.1	Подпятник	4
263.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
263.3	Устройство для подтягивания	1
263.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
264	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB10SL, в составе:	
264.1	Подпятник	4
264.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
264.3	Лестница для подтягивания	1
264.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
265	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1S0L, в составе:	
265.1	Подпятник	4

265.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
265.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
265.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
266	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1SBL, в составе:	
266.1	Подпятник	4
266.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
266.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
266.4	Устройство для подтягивания	1
266.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
267	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1SSL, в составе:	
267.1	Подпятник	4
267.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
267.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
267.4	Лестница для подтягивания	1
267.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
268	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1COL, в составе:	
268.1	Подпятник	4
268.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
268.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
268.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
269	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1CBL, в составе:	
269.1	Подпятник	4
269.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
269.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
269.4	Устройство для подтягивания	1
269.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
270	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HB1CSL, в составе:	
270.1	Подпятник	4
270.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
270.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
270.4	Лестница для подтягивания	1
270.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
271	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW000I, в составе:	
271.1	Колеса	4

271.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
272	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00BL, в составе:	
272.1	Колеса	4
272.2	Устройство для подтягивания	1
272.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
273	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00SL, в составе:	
273.1	Колеса	4
273.2	Лестница для подтягивания	1
273.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
274	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00CL, в составе:	
274.1	Колеса	4
274.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
274.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
275	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00BL, в составе:	
275.1	Колеса	4
275.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
275.3	Устройство для подтягивания	1
275.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
276	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00SL, в составе:	
276.1	Колеса	4
276.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
276.3	Лестница для подтягивания	1
276.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
277	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00SL, в составе:	
277.1	Колеса	4
277.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
277.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
278	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00BL, в составе:	
278.1	Колеса	4
278.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
278.3	Устройство для подтягивания	1
278.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
279	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW00SL, в составе:	
279.1	Колеса	4



279.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
279.3	Лестница для подтягивания	1
279.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
280	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW100L, в составе:	
280.1	Колеса	4
280.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
280.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
281	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW10BL, в составе:	
281.1	Колеса	4
281.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
281.3	Устройство для подтягивания	1
281.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
282	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW10SL, в составе:	
282.1	Колеса	4
282.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
282.3	Лестница для подтягивания	1
282.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
283	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1S0L, в составе:	
283.1	Колеса	4
283.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
283.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
283.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
284	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1SBL, в составе:	
284.1	Колеса	4
284.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
284.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
284.4	Устройство для подтягивания	1
284.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
285	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1SSL, в составе:	
285.1	Колеса	4
285.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
285.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
285.4	Лестница для подтягивания	1
285.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с	2

	деревянной вставкой	
286	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1C0L, в составе:	
286.1	Колеса	4
286.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
286.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
286.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
287	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1CBL, в составе:	
287.1	Колеса	4
287.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
287.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
287.4	Устройство для подтягивания	1
287.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
288	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций подъемная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq3-HW1CSL, в составе:	
288.1	Колеса	4
288.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
288.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
288.4	Лестница для подтягивания	1
288.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
	Подпятник	4
II	Принадлежности:	-
1.	Полка	1
2.	Центральный тормоз	1
3.	Столик пластиковый	1
4.	Столик деревянный	1
5.	Крючок-держатель	1
III	Руководство по эксплуатации и паспорт	1

* - Спинка пластмассовая в составе: спинка пластмассовая головная – 1 шт., спинка пластмассовая ножная – 1 шт.



Приложение 3
Габаритные размеры

Кровать без подъема

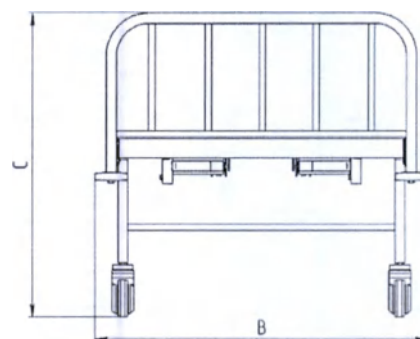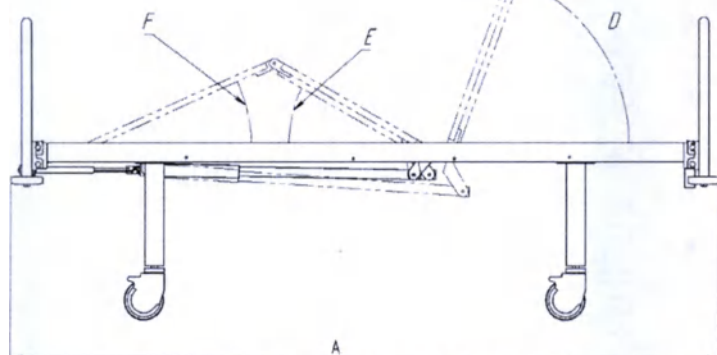

A	B	C	D	E	F
2230±5 мм	1042±5 мм	950±5 мм	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°

Кровать с подъемом

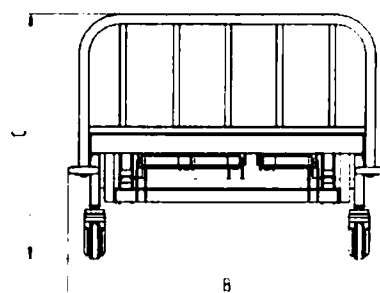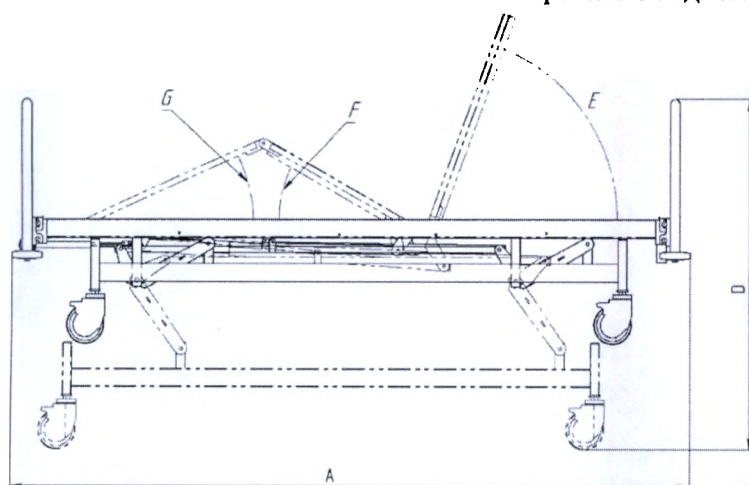


A	B	C	D	E	E	F
2230±5 мм	1042±5 мм	800±5 мм	1150±5 мм	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°

Приложение 4


Габаритные размеры

Поручень вставной

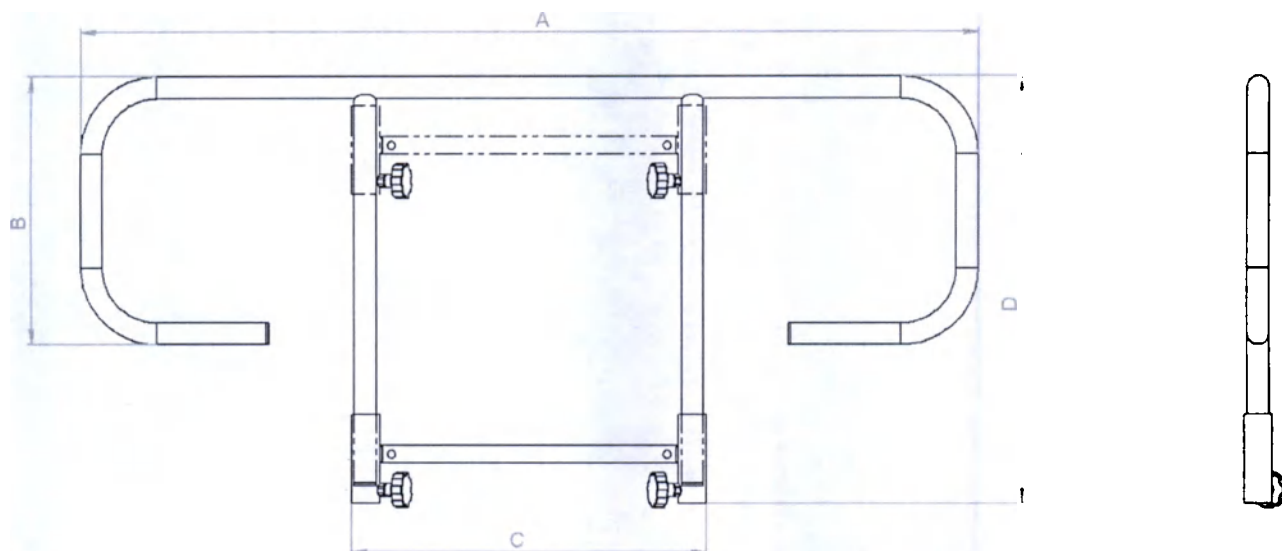


A	B	C	D
1025±2 мм	305±2 мм	405±2 мм	135±2÷485±2 мм

Поручень с деревянной вставкой

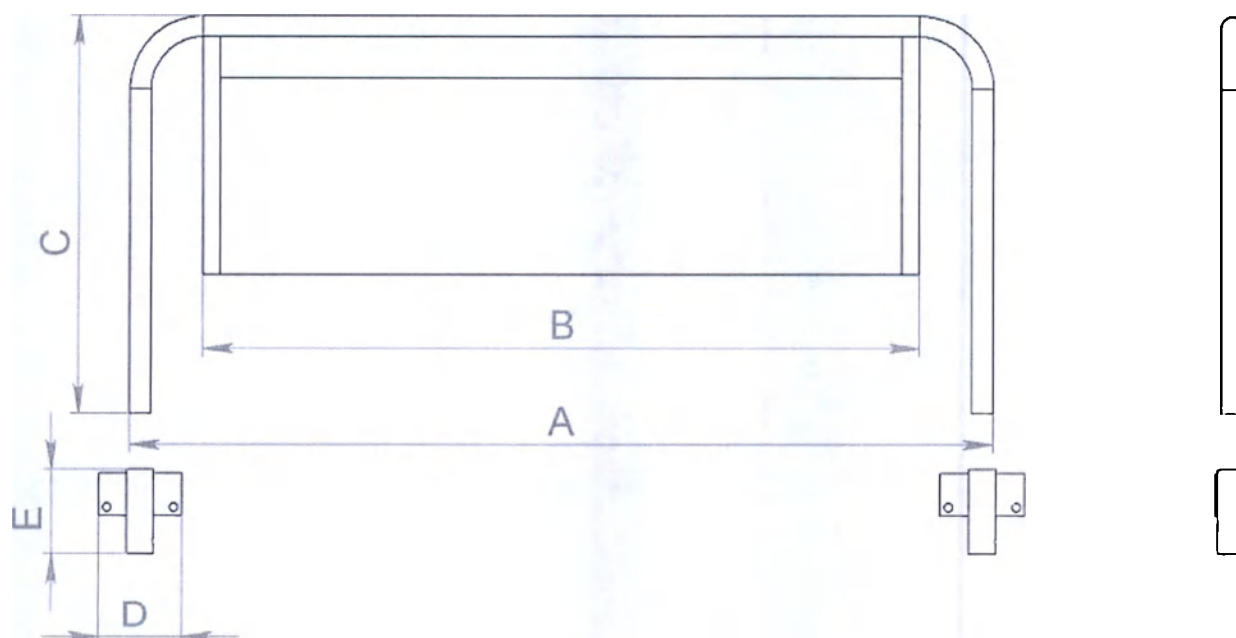


A	B	C	D	E
1025±2 мм	850±2 мм	470±2 мм	100±2 мм	100±2 мм

Складной поручень

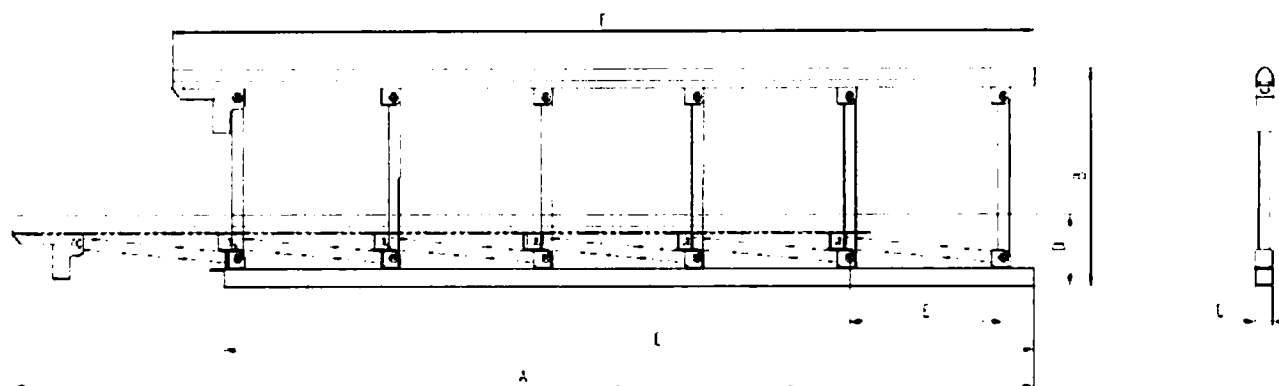


A	B	C	D	E	F	G
1747±5 мм	400±5 мм	1380±2 мм	120±5 мм	260±2 мм	1467±2 мм	30±2 мм

Пластмассовый малый поручень

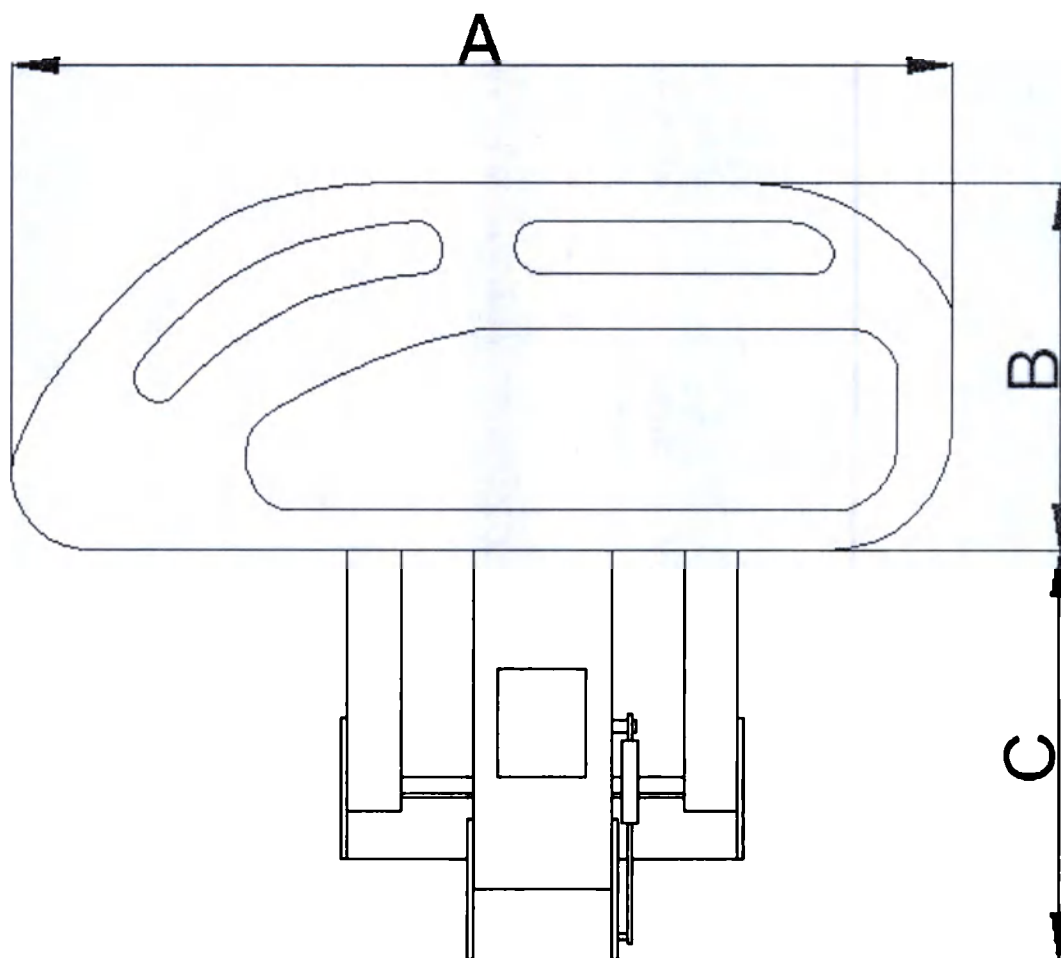

A	B	C
570±2 мм	280±2 мм	260±2 мм

Пластмассовый большой поручень

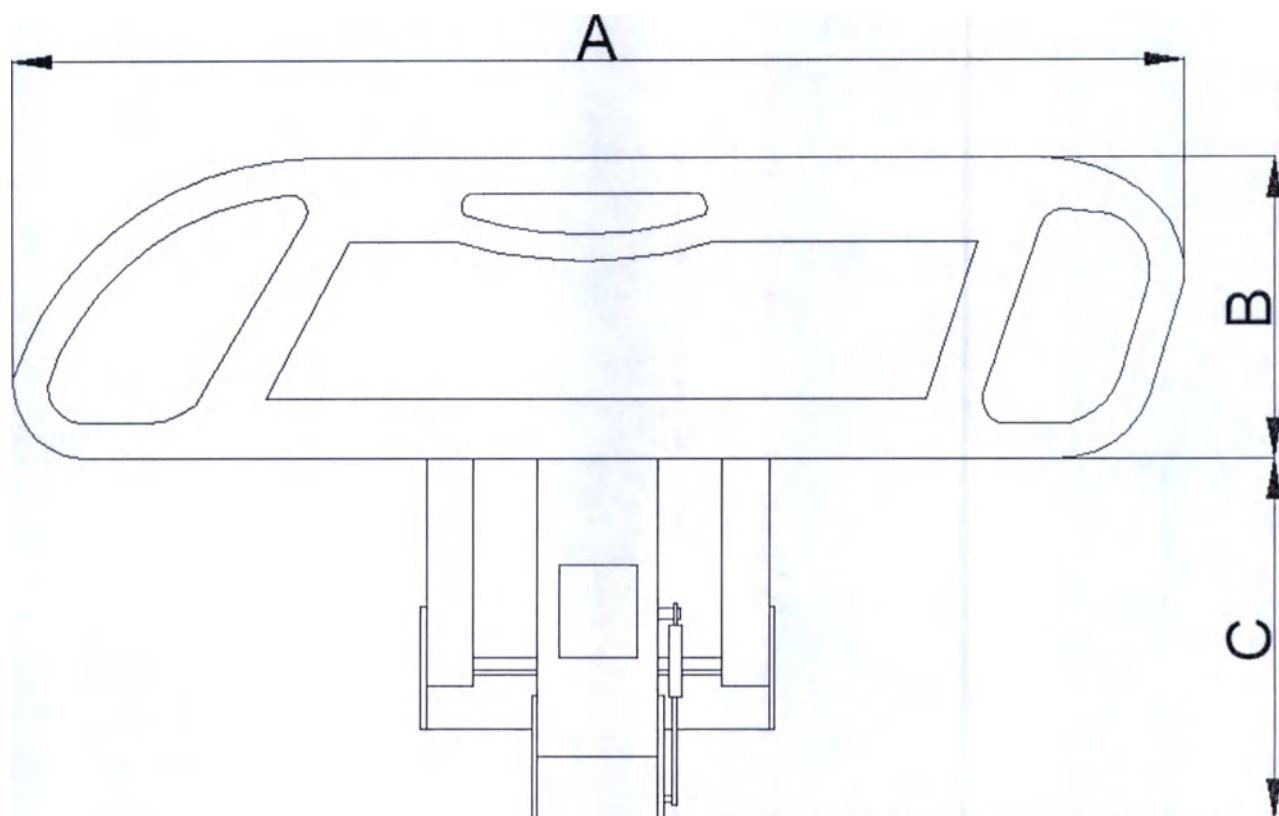


A	B	C
1000±2 мм	250±2 мм	250±2 мм

Приложение 5



Габаритные размеры

Стойка для капельницы из нержавеющей стали

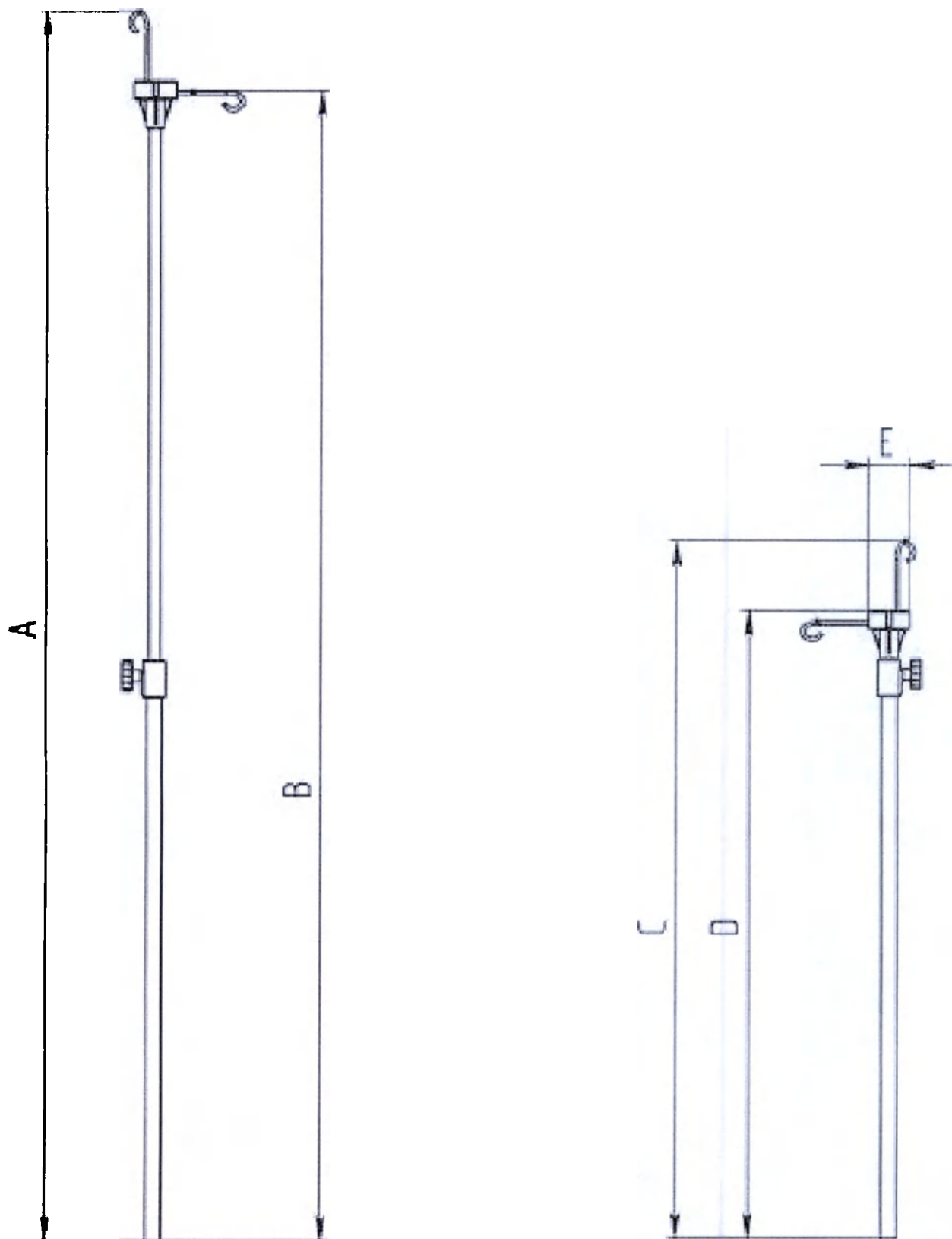

A	B	C	D	E
1485±5 мм	1390±5 мм	865±5 мм	775±5 мм	55±2 мм

Стойка для капельницы из покрашенной стали

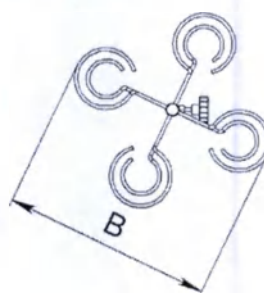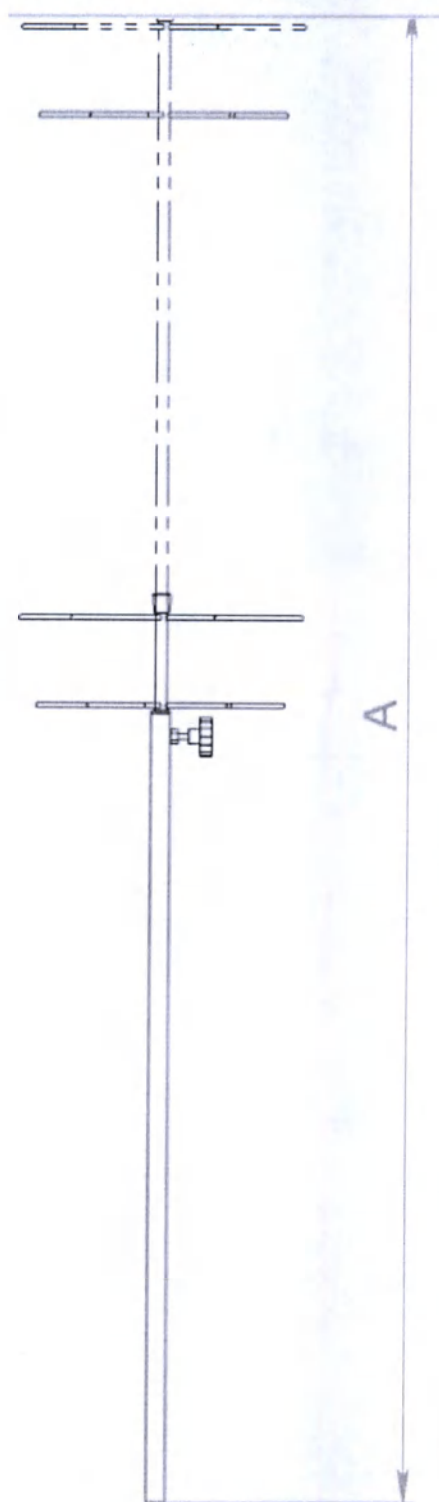


A	B
$930 \pm 5 \div 1510 \pm 5$ мм	305 ± 5 мм

Приложение 6

Габаритные размеры

Стойка для подтягивания

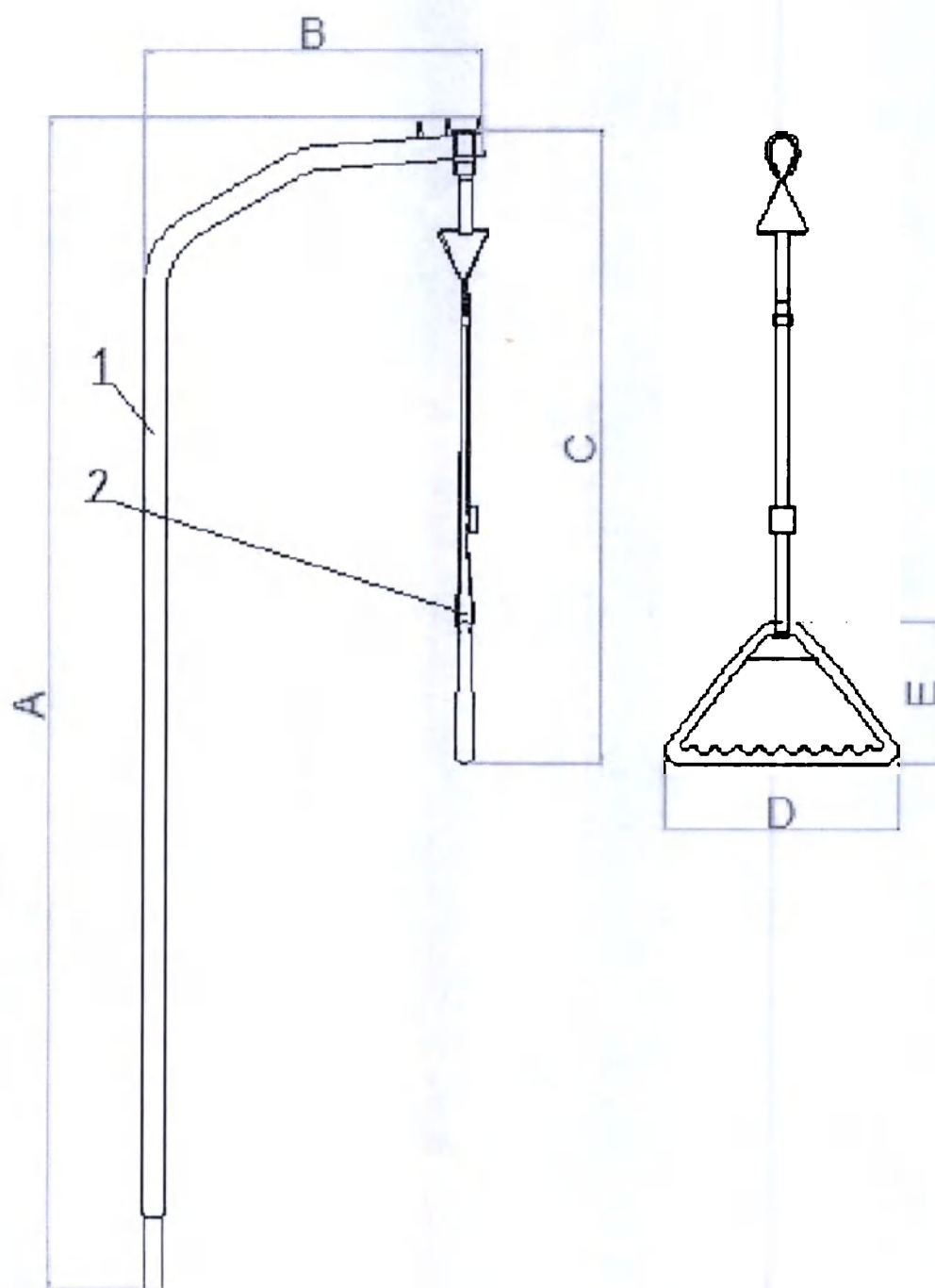


1 – Стойка подтягивания; 2 – Навесной элемент

A	B	C	D	E
1610±5 мм	470±5 мм	450±5÷980±5 мм	270±5 мм	195±5 мм

Приложение 7


Габаритные размеры

Лестница для подтягивания

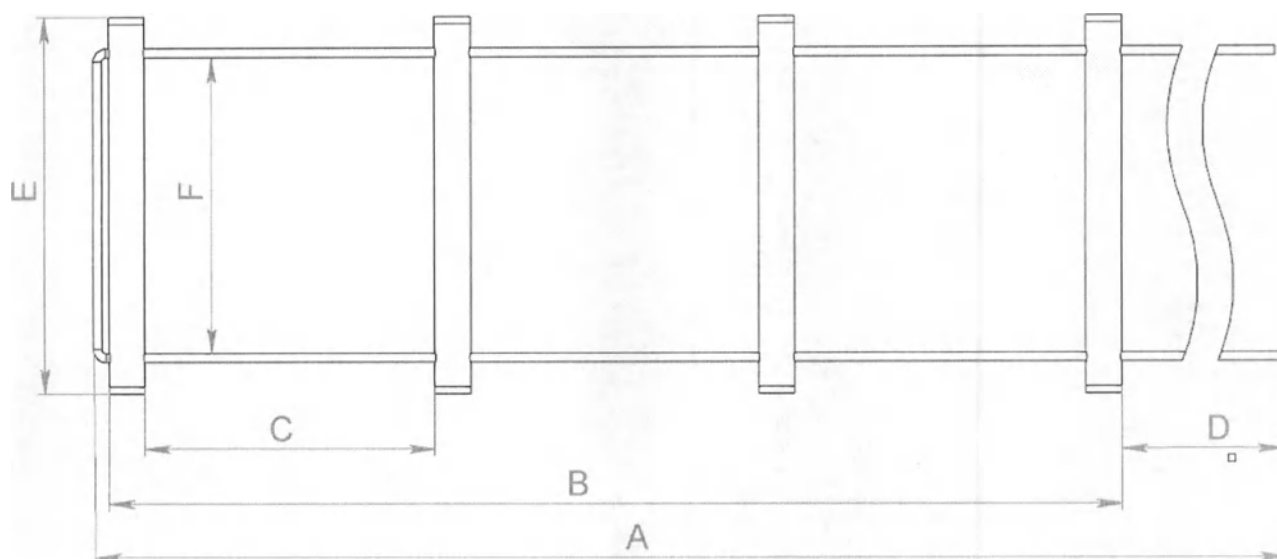

A	B	C	D	E	F
3155±5 mm	700±5 mm	200±5 mm	2445±5 mm	260±5 mm	204±5 mm

Приложение 8
Габаритные размеры
 Полка

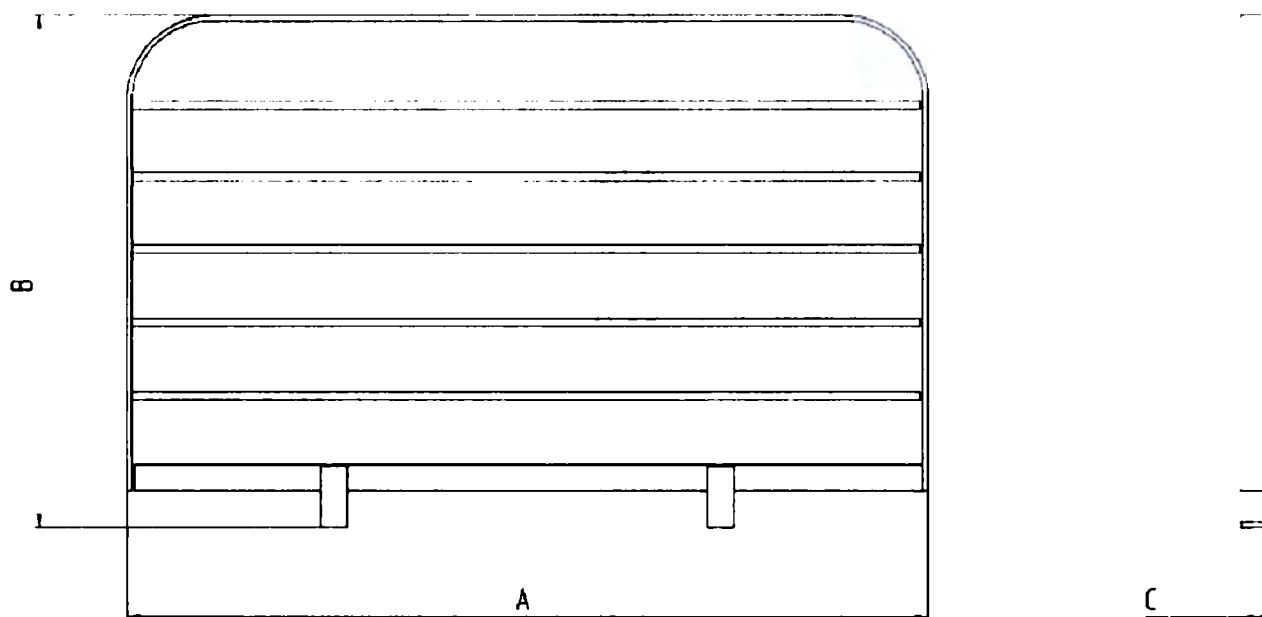


A	B	C
600±5 мм	383±5 мм	24±1 мм



Приложение 9

Схема центрального тормоза

1. Колесо Ø125 с трехпозиционной тормозной системой
2. Колесо Ø125 с двухпозиционной тормозной системой
3. Педаль
4. Эксцентрик
5. Прут (шестигранный)
6. Рычаг 28 мм
7. Винт М8

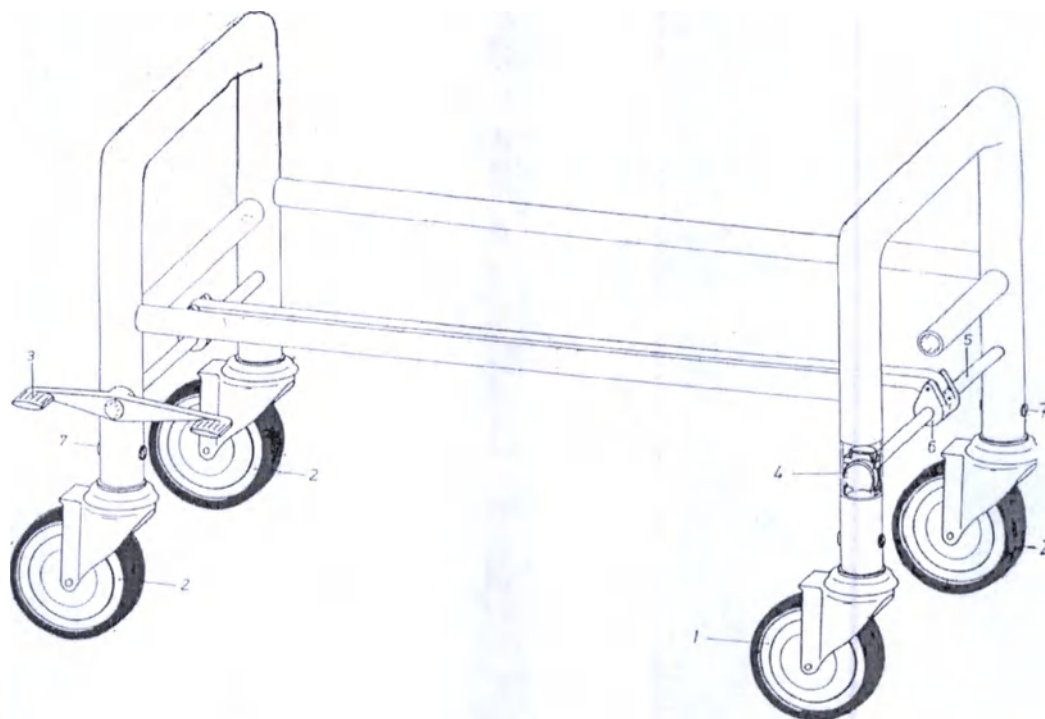

Приложение 10
Габаритные размеры
Столик

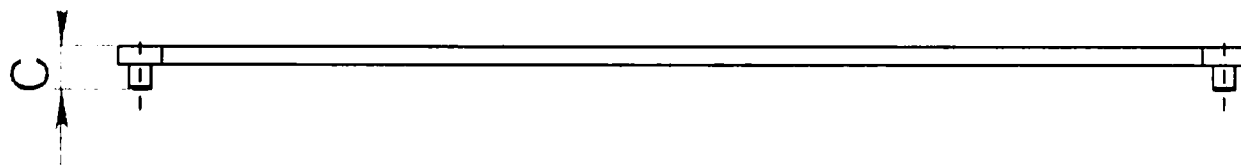
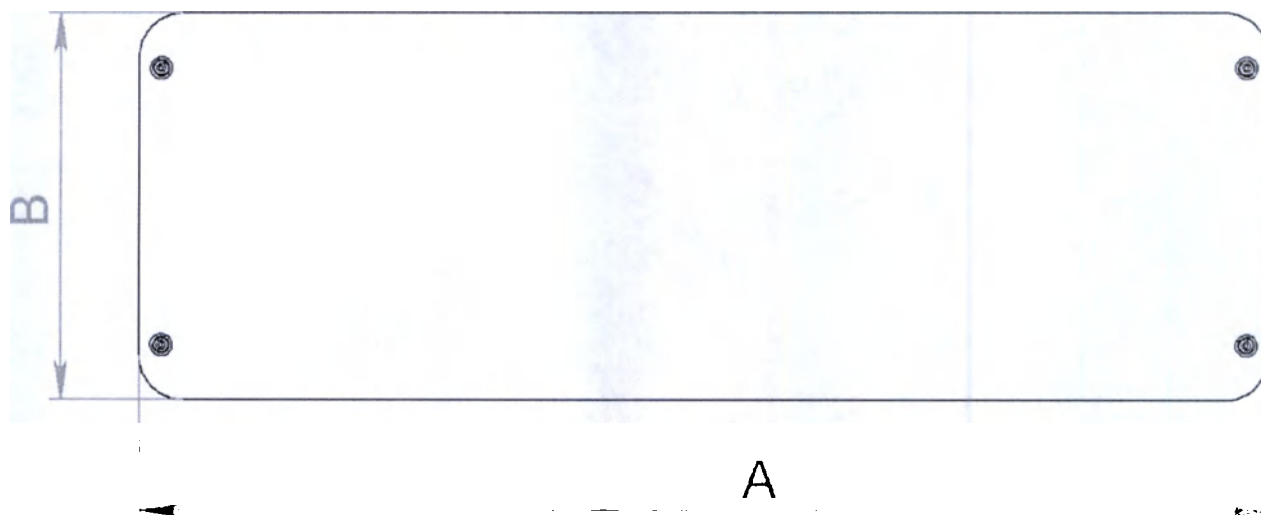


A	B	C
1020±2 мм	350±2 мм	39±2 мм

Приложение 11

Габаритные размеры

Крючок-держатель

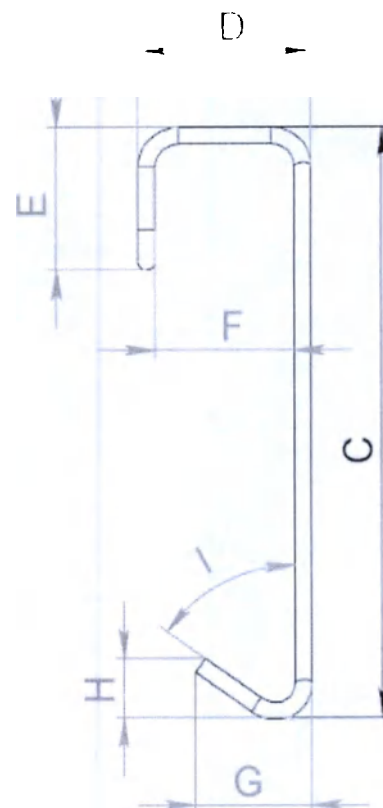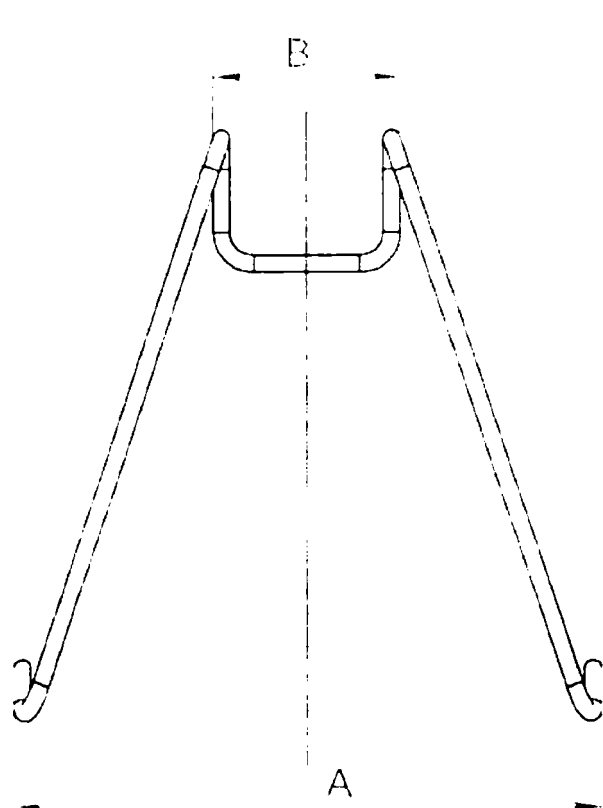


A	B	C	D	E	F	G	H	I
140±2 MM	45±2 MM	140±2 MM	41±2 MM	34±2 MM	33±2 MM	28±1 MM	14±1 MM	55° ±5°

Приложение 12

Габаритные размеры

Пластиковая спинка

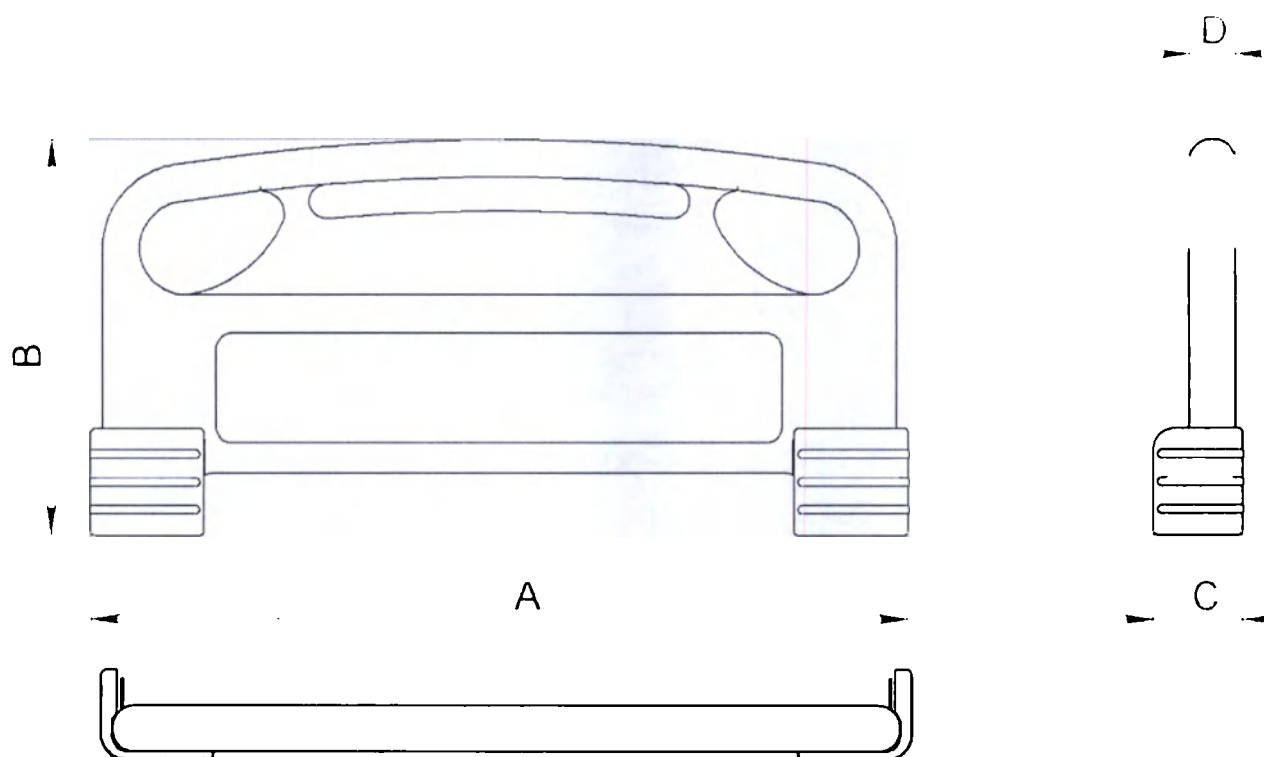



Размеры спинки пластмассовой головной

A	B	C	D
940±5 мм	525±5 мм	100±2 мм	50±2 мм

Размеры спинки пластмассовой ножной



A	B	C	D
940±5 мм	435±5 мм	100±2 мм	50±2 мм

Спинка металлическая

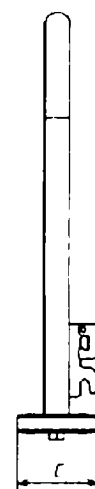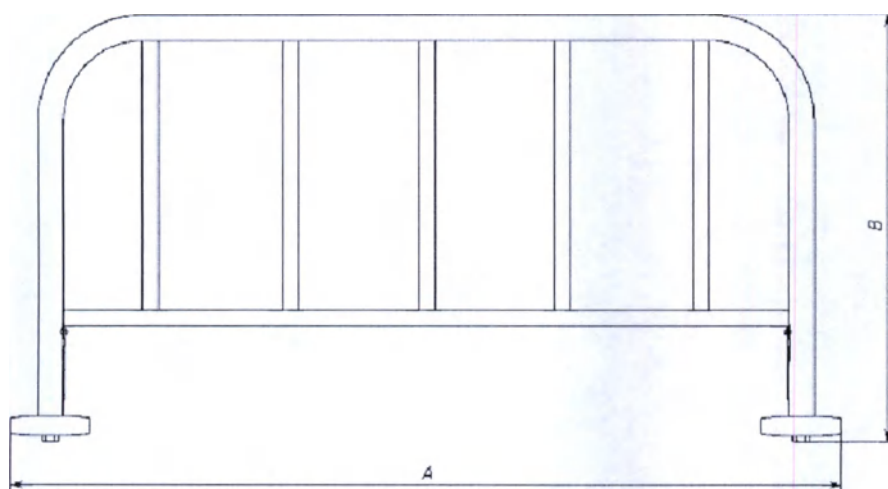

A	B	C
1042±5 мм	532±5 мм	102±4 мм

Спинка металлическая с деревянной вставкой

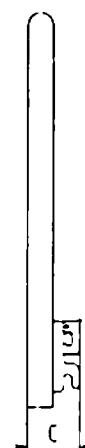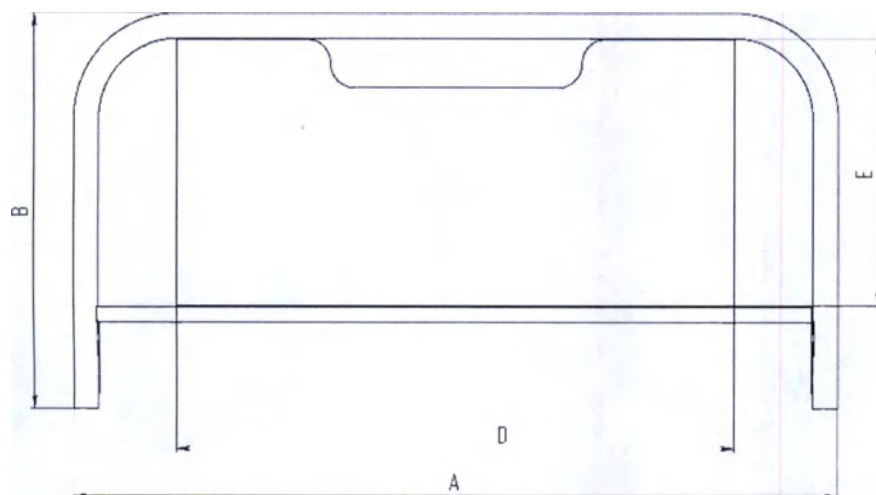

A	B	C	D	E
975±5 мм	500±5 мм	68±2 мм	710±5 мм	336±4 мм

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Кровать медицинская механическая, трехсекционная с
регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций
Rebq3-LW1CS0 с принадлежностями
по ТУ 32.50.30-003-27127705-2019**

1. Назначение

• Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebq3-LW1CS0 с принадлежностями (далее – кровать, изделия), предназначена для размещения лежащих пациентов и обеспечения физиологически правильного расположения больного.

• Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а также домашние условия.

• Показания к применению:

- размещение лежащих пациентов;

- обеспечение физиологически правильного расположения больного.

• Противопоказания к применению: отсутствуют.

• Безопасная номинальная нагрузка на кровать составляет 150 кг, основанная на весе пациента и весе матраса и дополнительными аксессуарами.

• Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

2. Технические характеристики

2.1 Основные параметры и размеры.

2.1.1 Основные параметры и размеры кровати указаны в таблице 1.

Вид оборудования	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм		Угол наклона секции к гориз., угл. град.			Масса без доп. оборудования, не более, кг.	
			не подъемная	подъемная	спинной	тазобедренной	икроножной	не подъемная	подъемная
Кровать Rebq3	2230±5	1042±5	950±5	800±5÷1150±5	0-70±5°	0-30±2°	0-20±2°	65	88

2.2 Характеристики:

2.2.1 Кровать должна выдерживать номинальную нагрузку 150 кг, равномерно распределенную на секции и не иметь после сильной нагрузки остаточной деформации.

2.2.2 Механическая прочность кровати должна быть не менее 300 кг.

2.2.3 Кровать может быть оснащена 4-мя колесами диаметром 125±0,5 мм (или стоять на подпятниках). Все колеса должны быть самоориентирующимися и легко без засаждений проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна.

2.2.4 Кровать может быть оборудована центральным тормозом, обеспечивающим удержание кровати с пациентом в неподвижном состоянии.

2.2.5 Колеса не должны оставлять на полу помещения никаких отпечатков.

2.2.6 Усилие, прилагаемое к тормозному устройству колес, должно быть не более 100 Н.

2.2.7 Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки, приложенное к спинке в направлении движения вдоль плоскости пола, должно быть не более 100 Н.

2.2.8 Центральные тормоз, должен удерживать от перемещения кровать, с размещенной на ней номинальной нагрузкой, при приложении усилия до 300 Н.

2.2.9 Усилия, прилагаемые к рукояткам механизмов изменения углов наклона секций, с размещенной на них номинальной нагрузкой, не должны превышать 50 Н.

2.2.10 Металлические и неметаллические (неорганические) покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150.

2.2.11 Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104, наружные поверхности должны иметь покрытия не ниже IV класса по ГОСТ 9.032.

2.2.12 Средний срок службы кровати не менее 6 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления кровати путем ремонта.

3. Комплект поставки

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт
1	Кровать медицинская механическая, трехсекционная с регулировкой спинной, тазобедренной и икроножной секций Rebq3-LW1CS0 по ТУ 32.50.30-003-27127705-2019, в составе:	
1.1	Колеса	4
1.2	Поручень вставной	2
1.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
1.4	Устройство для подтягивания в виде лестницы	1
1.5	Спинка пластмассовая	2
II	Принадлежности:	-
1.	Столик деревянный	1
III	Руководство по эксплуатации и паспорт	1

4. Ввод в эксплуатацию

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- Колеса заблокированы (для исполнения с колесами);
- Никакие препятствия – ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. – не мешают регулировке.

- Все регулировочные функции проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к использованию кровати.

4.1 Требования к расположению

- В помещении должно быть достаточно места для полноценной регулировки кровати. Мебель, подоконники и пр. не должны препятствовать регулировке.

- Перед использованием кровати на паркетных полах следует проверить, не приведут ли колеса к обесцвечиванию или другому ущербу. Желательно, чтобы пол помещения был покрыт плиткой, ламинатом или линолеумом.

При расположении кровати следует обратить особое внимание на следующие пункты с целью минимизации возможного риска.

- Желательно использовать только огнестойкие матрасы и постельные принадлежности;
- Следует воздерживаться от курения, поскольку матрас и постельные принадлежности могут не быть дымозащитными;

- Дополнительные изделия (такие, как обогревательные одеяла, к примеру) должны быть в исправном рабочем состоянии;

- Следует следить за тем, чтобы данное обогревательное оборудование применялось по прямому назначению, и чтобы никакие изделия не были забыты на или под кроватью во избежание перегрева;

- Желательно избегать применения штепсельных колодок и удлинителей – из-за возможности просачивания жидкостей.

4.2 Готовность к использованию

- Перед первым использованием кровати, а также при ее повторном применении следует провести ее очистку и дезинфекцию.

- После успешного завершения пп 4.1 – 4.2 кровать можно использовать по назначению.

5. Правила безопасности для пользователя


5.1 Всегда проверять, переведен ли ложемент в нижнее положение перед тем, как пациент будет оставлен без внимания. Таким образом, можно предотвратить травмирование пациента в случае падения при вставании с кровати или укладывании на нее.

5.2 Чтобы обезопасить пациентов, от непредвиденных автоматических смещений, необходимо, чтобы механизмы регулировки кровати были надежно зафиксированы, в момент когда не используются.


6. Сборка и установка кровати

6.1 Сборка и установка кровати осуществляется квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем медицинского изделия.

6.2 Поскольку кровать может быть переведена в наклонное (опущенный ножной конец при поднятом головном) положение, очень важно убедиться в том, что головная и ножная части не перепутаны. Соответствующие наклейки находятся на:

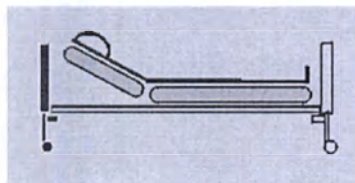


Наклейка головного конца находится на изголовье кровати

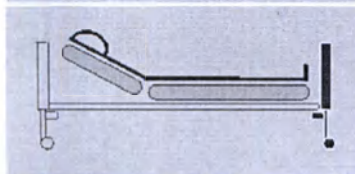

Наклейка ножного конца находится на изножье кровати

6.3 Установка аппаратных колес (при эксплуатации исполнения с колесам)

Ввернуть колеса в торцы опор. Применить одно колесо с тормозом и одно – без. Для лучшей фиксации кровати рекомендуется устанавливать колеса с тормозом по диагонали. Колеса снимаются с блокировки только при необходимости переместить кровать.

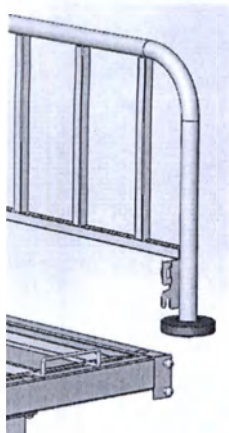

6.4 Установка спинок

По углам рамы кровати имеются два опорных штыря. Для установки спинок поднимите фиксаторы установочных пластин на спинках и опустите спинку на штыри, после чего опустите фиксаторы.

6.5 Вставной поручень

Вставной поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

6.6 Лестница для подтягивания

Лестница для подтягивания используется пациентом для самостоятельного поднятия из лежачего положения. Пациент приподнимает тело, поочередно цепляясь за перекладины. Лестница крепится в ножной части кровати с помощью удлиненных концов веревки.

6.7 Столик

Столик устанавливается на поручни кровати. Пластиковые опоры столика служат одновременно ограничителями движения при расположении его на поручнях.

7. Очистка и дезинфекция

7.1 Инструкции по очистке и дезинфекции

- Снять постельное белье и отправить в прачечную.
- Прочистить все поверхности, включая реечную раму (ламели) кровати мягким экологически чистящим раствором.

• Если кровать загрязнена инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать ее протиркой агентами, одобренными СЭС и пригодными для соответствующих поверхностей. Дезинфекция колес должна производиться только в том случае, если они видимо загрязнены инфекционными или потенциально инфекционными материалами.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только в больницах, при наличии у пациента мультирезистентного патогенна.

Дезинфекция кровати непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистых» и «грязных» кроватей при их транспортировке. Это в свою очередь, предотвращает распространение внутрибольничных болезнетворных микроорганизмов, что может быть обеспечено следованием данным рекомендациям.

Неиспользуемая кровать должна быть отправлена на хранение в накрытом состоянии, для предохранения ее от загрязнения.

7.2 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы кровати следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуются протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими (неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.
- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.

• Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.



7.2.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.
- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.
- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.
- После завершения дезинфекции провентилировать помещение.
- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление, при котором выделяются большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.
- Кроме того, протирка имеет более существенное значение.

7.3 Метод дезинфекции

Дезинфекцию проводят протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% универсального моющего средства, при температуре раствора не менее плюс 18 °C, два раза с интервалом между протираниями 10-15 минут.

8. Техническое обслуживание

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 6 лет в зависимости от условий и частоты применения.



Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

С этой целью необходимо проводить регулярный осмотр кровати для обеспечения постоянной гарантии ее безопасности и проверки работоспособности, как описано ниже.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

Рекомендации:

Ежемесячная проверка всех механических компонентов.



В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

9. Транспортирование и хранение

Эксплуатация	Температура Влажность (без конденсации)	+10°C....+35° C 30%.....75%
Транспортировка и хранение	Температура Влажность (без конденсации)	-50°C....+50° C 30%.....75%

10. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие качества кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-003-27127705-2019 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В гарантию не входят поломки, возникшие по причине ненадлежащей эксплуатации.

По вопросам гарантийного или текущего ремонта обращаться к: Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

11. Утилизация

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

12. Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Печать, подпись _____

ООО "РЕАБИЛИТИК"
Итого в настоящем документе

_____ листа (ов)

Генеральный директор
Мухин А.А.

