

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Реабилитик»

А.А. Мухин
«22» ноября 20 19 г.

**Кровать медицинская, односекционная Rebq1 с принадлежностями по ТУ
32.50.30-001-27127705-2019**

Руководство по эксплуатации

	СОДЕРЖАНИЕ	
1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2	ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
3	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	7
4	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРОВАТИ	8
5	ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ	10
6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
7	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	12
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
9	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15
10	ГАРАНТИЯ	15
11	УТИЛИЗАЦИЯ	15
12	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ	15
13	МАРКИРОВКА	16
14	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	16
15	ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	17
	Приложение 1	18
	Приложение 2	20
	Приложение 3	46
	Приложение 4	47
	Приложение 5	50
	Приложение 6	52
	Приложение 7	53
	Приложение 8	54
	Приложение 9	55
	Приложение 10	56
	Приложение 11	57
	Приложение 12	58
	Приложение 13	60

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед первым использованием кровати:

- Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы избежать повреждений, вызванных ошибочными действиями.
- Перед использованием протрите или продезинфицируйте кровать.

Данное Руководство содержит полную информацию о правилах безопасности, которым необходимо неукоснительно следовать. Все пользователи, работающие с медицинской кроватью, должны быть хорошо ознакомлены с этой инструкцией, и следовать всем указаниям о безопасном использовании.

1.1 Определение лиц и групп

Квалифицированный персонал по сборке кровати

Квалифицированный персонал должен ознакомиться с данной инструкцией.

Пользователь

Пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией.

Пациент

В данном Руководстве Пациентом названы недееспособные или нуждающиеся в уходе больные, занимающие эту кровать.

1.2 Информация о безопасности

Кровать представляет собой изделие, соответствующее современным технологиям.

Кровать медицинская, односекционная Rebq1 с принадлежностями может быть использована только в случае абсолютной уверенности в ее исправном состоянии.

1.2.1 Интерпретация использованных символов

Знаки, предупреждающие о личной опасности:



опасность

Данный знак сообщает об опасности для жизни или здоровья.

Предупреждение об опасности ущерба для имущества



внимание

Этот знак сигнализирует о возможном ущербе для имущества.

Другие рекомендации



совет

Общие замечания, призванные облегчить применение кровати и лучшего понимания принципов ее использования.

Символы безопасности не могут быть заменой ознакомлению с Руководством, вследствие чего внимательное прочтение и неукоснительное следование приведенной информации о безопасности, является необходимым.

1.2.2 Правила безопасности пользователей

• Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено вместе с кроватью, гарантирует, что каждый пользователь будет ознакомлен с правилами безопасной работы с кроватью перед ее применением. Необходимо привлечь внимание к возможности риска в случае неправильного использования кровати. В особенности это относится к поручням.

- Каждый раз перед использованием кровати проверять ее полную работоспособность.
- Убедиться, что никакие помехи, такие, как мебель, скошенный потолок, подоконники и т.п., не препятствуют регулировке кровати.
- В случае подозрения на повреждения или нарушение функционирования кровати,

необходимо произвести проверку.

1.3 Описание изделия

Кровать выпускается в следующих исполнениях: см. Приложение 1.

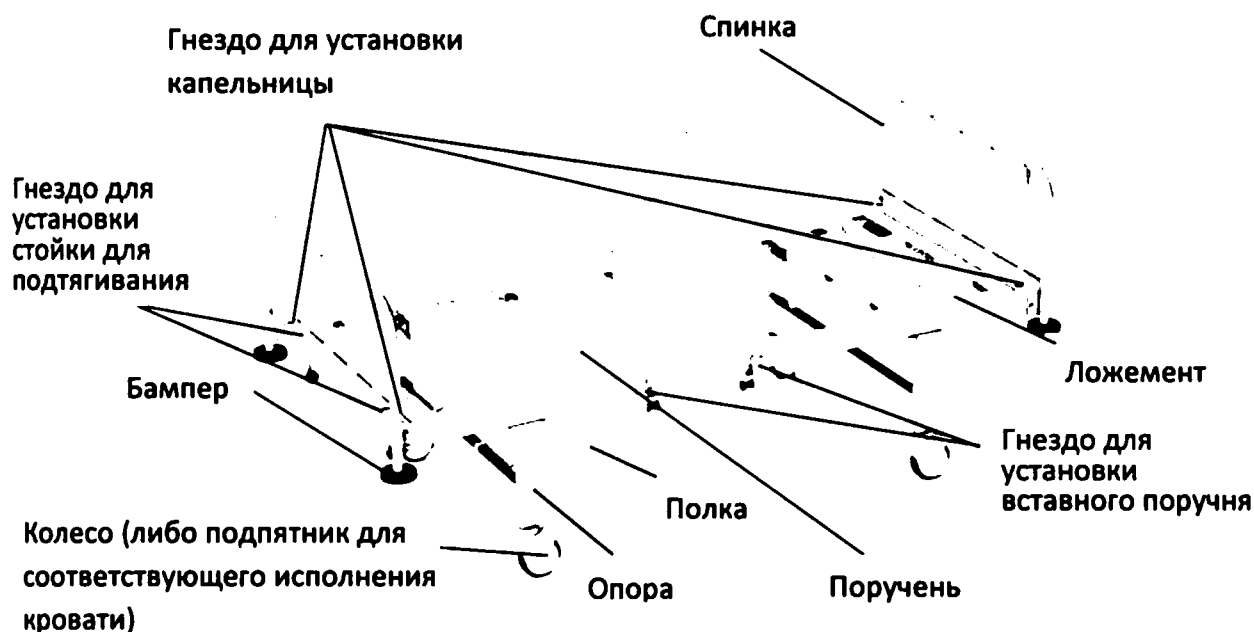


Рисунок 1. Общий вид кровати

1.3.1 Назначение

- Кровать медицинская, односекционная Rebq1 с принадлежностями (далее – кровать, изделие), предназначена для размещения лежачих пациентов и обеспечения физиологически правильного расположения больного.
- Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля, а также домашние условия.
- Показания к применению:
 - размещение лежачих пациентов;
 - обеспечение физиологически правильного расположения больного.
- Противопоказания к применению: отсутствуют.
- Безопасная номинальная нагрузка на кровать составляет 150 кг, основанная на весе пациента и весе матраца и дополнительными аксессуарами.
- Кровать пригодна для многократного применения. При повторном использовании кровати необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

Кровать может быть использована только в соответствии с данным Руководством. Любое другое использование рассматривается как несоответствующее требованиям.

1.3.2 Комплект поставки

Комплект поставки кровати представлен в приложении 2.

Рама кровати односекционная

Рама состоит из одной секции.

Опора кровати

Либо отдельные опоры, либо торцы-опоры

Поручень

Для предотвращения падения пациента с кровати предусмотрены поручни с обеих сторон, которые служат барьером и по мере необходимости могут убираться.

Поручни могут быть: - поручень вставной;

- поручень с деревянной вставкой;

- складной поручень;

- пластмассовый малый поручень;

- пластмассовый большой поручень.

Стойка для капельницы

Для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемых при проведении лечебных процедур.

Стойка для капельницы может быть: - стойка для капельницы из нержавеющей стали с 2-мя складными крючками;

- стойка для капельницы из покрашенной стали с держателями.

Стойка для подтягивания

Для самостоятельного принятия пользователем более удобного положения в кровати.

Лестница для подтягивания

Для самостоятельного принятия пользователем сидячего положения в кровати.

Принадлежности:

Полка

Для размещения судна.

Центральный тормоз

Для единой регулировки тормозной системы колес.

Столик

Для размещения инструментов, медикаментов, дезинфицирующих средств, туалетных принадлежностей и т.п.

Крючок-держатель

Для размещения мочеприемника.

2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Сборка и установка кровати осуществляется квалифицированным персоналом, уполномоченным производителем медицинского изделия.

2.1 Установка опор

Совместить отверстия на пластинах опор с резьбовыми отверстиями на раме каркаса (расположены снизу профильной трубы). Закрепить с помощью предустановленного крепежа винтов М8х20 и шайб 8.

Установка торцов-опор

Вставить штыри торцов-спинок в открытые отверстия каркаса основания. Скрепить конструкцию с помощью предустановленного крепежа (винты М8х20, шайбы 8).

2.2 Установка спинок (только для исполнений с опорами)

По углам рамы кровати имеются два опорных штыря. Для установки спинок поднимите фиксаторы установочных пластин на спинках и опустите спинку на штыри, после чего опустите фиксаторы.

2.3 Установка поручней

2.3.1 Установка складного поручня

Прикрутить складной поручень к раме кровати, совместив отверстия на нижней трубе поручня с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х50 с плоск.гол. с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн. винт. Zn. См. рис. 1.

2.3.2 Установка вставного поручня

Прикрутить держатель поручня к раме кровати, совместив отверстия на трубе держателя с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn. Чтобы установить поручень в рабочее положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.3 Установка вставного поручня с деревянной вставкой

Прикрутить держатель поручня к раме кровати, совместив отверстия на трубе держателя с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn. Чтобы установить поручень в рабочее положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

Не используйте поручни в качестве опоры!

2.3.4 Установка пластикового поручня (большого или малого)

Прикрутить поручень к раме кровати, совместив отверстия на крепежной пластине поручня с отверстиями на раме лежака. Для данного этапа сборки использовать предустановленный крепеж: винт М6х40 с плоск.гол.с внутр.шестигр. Zn и головка М6 мебельн.винт. Zn.

Не используйте поручни в качестве опоры!

Установка аксессуаров

Установить аксессуары на места, указанные на рисунке 1. Гнездо для установки стойки для подтягивания, снабжено болтовым фиксатором, который для фиксации стойки необходимо закрутить.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед каждым применением кровати пользователю необходимо убедиться в том, что:

- Колеса заблокированы (для исполнения с колесами);
- Никакие препятствия – ночные столики, кабельные желоба, стулья и т.п. – не мешают

регулировке.

Только после этого можно приступить к использованию кровати.

3.1 Требования к расположению

• В помещении должно быть достаточно места для полноценной регулировки кровати. Мебель, подоконники и пр. не должны препятствовать регулировке.

• Перед использованием кровати на паркетных полах следует проверить, не приведут ли колеса к обесцвечиванию или другому ущербу. Желательно, чтобы пол помещения был покрыт плиткой, ламинатом или линолеумом.

При расположении кровати следует обратить особое внимание на следующие пункты с целью минимизации возможного риска.

- Желательно использовать только огнестойкие матрасы и постельные принадлежности;
- Следует воздерживаться от курения, поскольку матрас и постельные принадлежности могут не быть дымозащитными;
- Дополнительные изделия (такие, как обогревательные одеяла, к примеру) должны быть в исправном рабочем состоянии;
- Следует следить за тем, чтобы данное обогревательное оборудование применялось по прямому назначению, и чтобы никакие изделия не были забыты на или под кроватью во избежание перегрева;
- Желательно избегать применения штепсельных колодок и удлинителей – из-за возможности просачивания жидкостей.

3.2 Готовность к использованию

• Перед первым использованием кровати, а также при ее повторном применении следует провести ее очистку и дезинфекцию в соответствии с гл. 5.

- После успешного завершения пп 3.1 – 3.2 кровать можно использовать по назначению.

4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КРОВАТИ

4.1 Специальные правила безопасности для регулировочных механизмов



- При использовании вспомогательного оборудования всегда необходимо проверять следующее: вспомогательное оборудование не создает сдавливающих или срезающих зон, представляющих опасность для пациента.

4.2 Колеса (в случае исполнения кровати с колесами)

Медицинская кровать оснащена четырьмя колесами, два из которых с индивидуальными тормозами.

Разблокировка: Толкнуть ногой переключатель отпуска тормоза в направлении ножки кровати.

Блокировка: Нажать ногой рычаг торможения.



← Отпуск тормоза Разблокировка

↓ Торможение

Два колеса на кроватях снабжены отдельным тормозом. Колеса блокируются, пока педаль тормоза фиксирует их в неподвижном положении. Тормоз отключается нажатием на разблокировочную педаль. Колеса кровати должны быть заблокированы, если необходимо, чтобы кровать находилась в неподвижном состоянии.

4.3 Поручни

4.3.1 Складной поручень

Положение складного поручня регулируется кнопкой, находящейся в верхней его части. Удерживая кнопку, установить поручень в нужное положение (опущенное (сложенное) или поднятое).

4.3.2 Вставной поручень

Вставной поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

4.3.3 Поручень вставной с деревянной вставкой

Поручень с деревянной вставкой имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, необходимо болтовые фиксаторы вкрутить до упора в держатели поручня. Чтобы опустить поручень, необходимо выкрутить болтовые фиксаторы, придерживая поручень свободной рукой.

4.3.4 Пластиковый поручень (большой и малый)

Пластиковый поручень имеет два положения. Чтобы установить поручень в рабочее (поднятое) положение, нужно потянуть его вверх. Чтобы опустить поручень, необходимо отжать фиксатор.

Не используйте поручни в качестве опоры!

Правила безопасности при пользовании поручней

Боковые поручни служат для того, чтобы обезопасить пациента от случайного падения с кровати. Они не предназначены для того, чтобы помешать пациенту сойти с кровати. В таких

случаях надо обратить особое внимание на следующие правила:

- Необходимо пользоваться только исправными неповрежденными боковыми поручнями.
- Удостовериться в том, что применяются поручни, поставляемые непосредственно с кроватью.

- При использовании кровати с поручнями необходимо принять во внимание соответствие ее характеристик телосложению пациента. Следует учесть расстояние между планками и крестовинами в отношении к конституции пациента. Для людей с небольшими размерами необходимо предусмотреть дополнительные предохранительные средства (в комплектацию данной модели такие средства не входят). Это может оказаться единственным способом предупреждения защемления пациента или его проскальзывания между планками.

- Регулярно проверять состояние боковых поручней и механических компонентов, осуществляющих их закрепление на ходовой части на наличие повреждений. Такая проверка должна проводиться не только перед установкой поручней, но также во время их применения на регулярной основе (по меньшей мере во время повторного использования).

Если эти правила не будут соблюдаться, это создаст опасность застревания конечностей пациента в боковых поручнях или его падения сквозь промежутки между планками, если они слишком велики в случае несоответствия размеров ограждений или при их неполном соединении.

4.4 Лестница для подтягивания

Лестница для подтягивания используется пациентом для самостоятельного поднятия из лежачего положения. Пациент приподнимает тело, поочередно цепляясь за перекладины. Лестница крепится в ножной части кровати с помощью удлиненных концов веревки.

4.5 Стойка для подтягивания

В головной части рамы кровати находятся два гнезда для расположения стойки для подтягивания.

Установка

Установить стойку в специально предназначенное гнездо (см. рис. 1). Зафиксировать положение болтовым фиксатором.


Демонтаж

Выкрутить болтовой фиксатор. Вытащить стойку в направлении вверх.

Пределы вращения стойки. Раскачивание стойки вне площади, занимаемой кроватью, может привести к ее опрокидыванию при приложении веса к штанге. Для предотвращения этого убедиться, что болтовой фиксатор закручен надежно.

Регулировка высоты опорной ручки.

Длина ремня опорной ручки может меняться в пределах 33-93 см с помощью регулировочных стяжек.

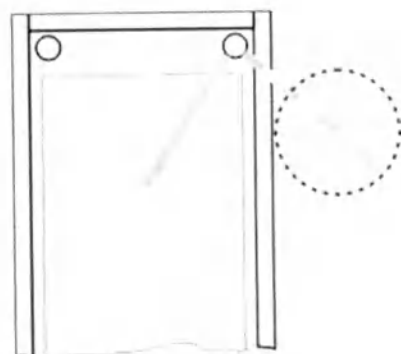

4.6 Стойка для капельницы

Капельница устанавливается в одно из четырех гнезд, указанных на рисунке 1.

4.7 Полка

Полка устанавливается под рамой кровати с ложементом на одну из опор. Крюки полки надеваются на поперечную трубу опоры.

4.8 Столик

Столик устанавливается на поручни кровати. Пластиковые опоры столика служат одновременно ограничителями движения при расположении его на поручнях.

4.9 Центральный тормоз (для исполнения с колесами)

Кровать оснащается центральной тормозной системой колес с единой педалью регулировки. Рама тормозной системы устанавливается на месте опор с помощью прилагаемого крепежа.

Три (из четырех) колеса с двухпозиционной центральной тормозной системой (С2), которая блокирует колесо и поворотный узел+полная разблокировка. Одно (из четырех) колесо с трехпозиционной центральной тормозной системой (С3), которая блокирует колесо и поворотный узел, либо только поворотный узел, либо полная разблокировка. Управление тормозной системой происходит через кулачковый механизм в стержне фиксации диаметром 28 мм.

4.10 Крючок-держатель

Крючок – держатель навешивается на раму кровати и служит для размещения мочеприемника.

5 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

5.1 Общая информация

Очистка – это самое важное средство и требование для успешной химической дезинфекции. Когда кровать используется одним и тем же пациентом, рутинная очистка кровати весьма существенна для обеспечения гигиенической обстановки. Дезинфекция ходовой части необходима только в том случае, когда она видимо загрязнена инфекционными или потенциально инфекционными материалами (кровь, стул, гной) или, при инфекционной болезни, по указанию врача. Кровать должна быть протерта и продезинфицирована перед тем, как ее займет новый пациент!

5.2 Инструкции по очистке и дезинфекции

- Снять постельное белье и отправить в прачечную.
- Прочистить все поверхности, включая реечную раму (ламели) кровати мягким экологически чистящим раствором.
- Если кровать загрязнена инфекционными или потенциально опасными материалами, следует продезинфицировать ее протиркой агентами, одобренными СЭС и пригодными для соответствующих поверхностей. Дезинфекция колес должна производиться только в том случае, если они видимо загрязнены инфекционными или потенциально инфекционными материалами.

Примечание: продолжительная дезинфекция необходима только в больницах, при наличии у пациента мультирезистентного патогенна.

Дезинфекция кровати непосредственно на месте имеет то преимущество, что таким образом предотвращается перемешивание «чистых» и «грязных» кроватей при их транспортировке. Это в свою очередь, предотвращает распространение внутрибольничных болезнетворных микроорганизмов, что может быть обеспечено следованием данным рекомендациям.

Неиспользуемая кровать должна быть отправлена на хранение в накрытом состоянии, для предохранения ее от загрязнения.

5.3 Чистящие и дезинфицирующие агенты

Чтобы максимально продлить срок службы кровати следует обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:

- Поверхность должна быть неповрежденной; любое повреждение должно быть устранено.
- Рекомендуются протирать влажной тканью. Чистящие вещества должны быть мягкими

(неагрессивными к коже и поверхности) и экологически чистыми. Можно использовать бытовые очистительные средства.

- Для очистки металлических поверхностей с покрытием наилучшим средством является влажная мягкая ткань, увлажненная коммерческим бытовым очистителем.



- Для дезинфекции с помощью протирки следует применять дезинфицирующие средства, одобренные СЭС в рекомендованных концентрациях.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, которые могут повредить поверхность.

5.3.1 Обращение с дезинфицирующими веществами

- Всегда готовить растворы в холодной воде, чтобы избежать образования паров, раздражающих слизистые оболочки.

- Надевать перчатки для исключения контакта с кожей.

- Никогда не следует оставлять готовые дезинфицирующие растворы в открытых сосудах с плавающими на поверхности кусками ткани. Необходимо всегда закрывать контейнеры.

- После завершения дезинфекции провентилировать помещение.

- Дезинфекцию производить протиркой. Исключить распыление, при котором выделяются большие порции вещества, что может привести к его попаданию в дыхательные пути.

- Кроме того, протирка имеет более существенное значение.

5.4 Метод дезинфекции

Дезинфекцию проводят протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% универсального моющего средства, при температуре раствора не менее плюс 18 °С, два раза с интервалом между протираниями 10 -15 минут.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кровать спроектирована и сконструирована для применения в течение длительного времени. Срок ее службы при соблюдении правил эксплуатации составляет не менее 6 лет в зависимости от условий и частоты применения.



Многократные перемещения, сборки и разборки, неправильное использование, а также длительное применение могут приводить к повреждениям, появлению дефектов и признаков износа, что может создавать опасность, если не устранять такие дефекты вовремя.

С этой целью необходимо проводить регулярный осмотр кровати для обеспечения постоянной гарантии ее безопасности и проверки работоспособности, как описано ниже.

Необходимо проинструктировать пользователей в нижеследующих правилах.

Необходимо производить минимальную визуальную проверку состояния и работоспособности кровати через частые регулярные промежутки времени и каждый раз перед повторным применением кровати.

Рекомендации:

Ежемесячная проверка всех механических компонентов.



В случае подозрения на наличие повреждения или неисправности, кровать должна быть немедленно выведена из эксплуатации до ремонта или замены неисправных частей.

7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к эксперту с требованием о техобслуживании или ремонте.

Таблица устранения неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Не работает центральный тормоз (для исполнения с колесами)	Неправильно нажата педаль	Нажать снова
	Недостаток смазки	Отсоединить и достать механизм, добавить смазку
	Поломка педали или колеса	Заменить колесо
Некоторые функции центрального тормоза не действуют	Некорректная установка шпильки	Переустановка шпильки
	Отсутствует шпилька	Замените шпильку и оси шарнира
Боковые ограждения не фиксируются в вертикальном положении	Неправильная установка	Действуйте согласно инструкции по установке
	Фиксирующее устройство повреждено	Заменить на новое
	Посторонний предмет препятствует фиксации	Удалите посторонний предмет

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Конструкция кровати должна обеспечивать удобное размещение на ней пользователей, а также обеспечение доступа к отдельным сборочным единицам и деталям, которые могут быть заменены в процессе эксплуатации и взаимозаменяемость этих изделий.

8.2 Несущие конструкции кровати должны изготавливаться замкнутого сечения. Накладные, декоративные элементы мебели закреплены неподвижно.

8.3 Кровать должна характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с её назначением, и должна отвечать необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

8.4 Все сварные швы должны быть непрерывными и сплошными, на видимой поверхности кровати не допускаются дефекты сварных соединений.

8.5 Фурнитура, выходящая на поверхность кровати, должна быть без заусенцев.

8.6 Наружная поверхность кровати не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей.

8.7 Кровать должна выдерживать номинальную нагрузку 150 кг, равномерно распределенную на секции и не иметь после сильной нагрузки остаточной деформации.

8.8 Механическая прочность кровати должна быть не менее 300 кг.

8.9 Кровать может быть оснащена 4-мя колесами диаметром $125 \pm 0,5$ мм (или стоять на подпятниках). Все колеса должны быть самоориентирующимися и легко без заеданий проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна.

8.10 Кровать может быть оборудована центральным тормозом, обеспечивающим удержание кровати с пациентом в неподвижном состоянии.

8.11 Колеса не должны оставлять на полу помещения никаких отпечатков.

8.12 Усилие, прилагаемое к тормозному устройству колес, должно быть не более 100 Н.

8.13 Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки, приложенное к спинке в направлении движения вдоль плоскости пола, должно быть не более 100 Н.

8.14 Центральный тормоз, должен удерживать от перемещения кровать, с размещенной на

ней номинальной нагрузкой, при приложении усилия до 300 Н.

8.15 Кровать может быть оснащена амортизаторами (бамперами), установленными на спинках, предохраняющими защитные покрытия кровати и стены помещений от ударов и повреждений.

8.16 Кровати должны стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес (или одной из ножек) не должно быть более 3 мм.

8.17 Съёмные приспособления должны крепиться к кровати без применения специального инструмента. Усилия фиксации съёмных приспособлений – не более 100 Н.

8.18 При изготовлении кровати и её компонентов должна обеспечиваться точность, позволяющая осуществить сборку без дополнительных подгонок.

Габаритные размеры кровати и её масса должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Вид оборудования		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса без доп. оборудования, не более, кг.
Кровать Rebq1	с опорой	2230±5	1042±5	950±5	45
	с торцом-опорой	1960±5	805±5		45

Внутренний диаметр гнезда для установки вставного поручня - 30±1мм.

Внутренний диаметр гнезда для установки стойки для капельницы - 21±1мм.

Внутренний диаметр гнезда для установки стойки для подтягивания - 29±1мм.

Габаритные размеры кровати приведен в приложении 3.

8.19 Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кровати и её компонентов, после падения.

8.20 Параметры поручней.

8.20.1 Габаритные размеры поручней приведены в приложении 4.

8.20.2 Масса поручней должна быть:

- поручень вставной не более 3 кг;
- поручень с деревянной вставкой не более 4,5 кг.
- складной поручень не более 3 кг.
- пластмассовый малый поручень не более 2 кг
- пластмассовый большой поручень не более 2,5 кг

8.20.3 Поручень должен выдерживать боковую нагрузку в верхней точке не менее 500 Н.

8.20.4 Установленный поручень должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 500 Н.

8.20.5 Безопасная нагрузка на складной механизм поручня должна быть не более 7 кг.

8.20.6 Безопасная нагрузка на фиксатор поручня должна быть не более 7 кг.

8.21 Параметры стойки для капельницы.

8.21.1 Габаритные размеры стоек для капельницы представлены в приложении 5.

8.21.2 Масса стойки для капельницы должна быть не более 3 кг.

8.21.3 Безопасная нагрузка на крючок должна быть не более 3 кг.

8.21.4 Количество крючков и держателей на стойках для капельниц должно быть:

- стойка для капельницы из нержавеющей стали: 2 складных крючка;
- стойка для капельницы из окрашенной стали: 4 держателя.

8.21.5 На стойках для капельницы из нержавеющей стали складные крючки для емкостей с инфузионными растворами должны закрепляться и регулироваться по высоте от 830±5 мм до 1530±5 мм при помощи винтовых зажимов. После закрепления крючки для инфузионных растворов не должны смещаться от усилия менее 10 даН.

8.21.6 На стойках для капельницы из покрашенной стали держатели для емкостей с инфузионными растворами должны закрепляться и регулироваться по высоте от 930 ± 5 мм до 1510 ± 5 мм при помощи винтовых зажимов. После закрепления крючки для инфузионных растворов не должны смещаться от усилия менее 10 даН.

8.22 Параметры стойки для подтягивания.

8.22.1 Габаритные размеры стойки для подтягивания приведены в приложении 6.

8.22.2 Масса стойки для подтягивания должна быть не более 3 кг.

8.22.3 Максимальная нагрузка на петлю должна быть 150 ± 10 кг.

8.22.4 Механическая прочность стойки для подтягивания должна быть 200 ± 20 кг.

8.22.5 Длина ремня должна регулироваться в интервале от 33 ± 2 до 93 ± 2 см.

8.23 Параметры лестницы для подтягивания.

8.23.1 Габаритные размеры лестницы для подтягивания приведены в приложении 7

8.23.2 Кол-во перекладин должно быть 4 штуки.

8.23.3 Масса лестницы для подтягивания должна быть не более 1,5 кг.

8.23.4 Максимальная нагрузка на веревку должна быть 200 ± 10 кг.

8.23.5 Максимальная нагрузка на перекладину должна быть 200 ± 10 кг.

8.23.6 Механическая прочность перекладины должна быть 300 ± 20 кг.

8.24 Параметры полки.

8.24.1 Габаритные размеры полки приведены в приложении 8.

8.24.2 Масса полки должна быть не более 3 кг.

8.24.3 Максимальная нагрузка на полку должна быть не более 10 кг.

8.25 Параметры центрального тормоза.

8.25.1 Три (из четырех) колеса с двухпозиционной центральной тормозной системой (С2), которая блокирует колесо и поворотный узел+полная разблокировка.

8.25.2 Одно (из четырех) колес с трехпозиционной центральной тормозной системой (С3), которая блокирует колесо и поворотный узел, либо только поворотный узел, либо полная разблокировка

8.25.3 Управление тормозной системой через кулачковый механизм в стержне фиксации диаметром 28 мм.

8.25.4 Схема центрального тормоза приведена в приложении 9.

8.26 Параметры столика.

8.26.1 Габаритные размеры столика приведены в приложении 10.

8.26.2 Масса столика должна быть не более 4,5 кг.

8.26.3 Стол должен выдерживать полуторакратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 30 ± 1 кг.

8.27 Параметры крючка-держателя

8.27.1 Габаритные размеры крючка-держателя приведены в приложении 11.

8.27.2 Выдерживаемая нагрузка на крючок должна быть не более 10 кг.

8.27.3 Масса крючка-держателя не более 0,05 кг.

8.28 Параметры спинок

8.28.1 Габаритные размеры спинок приведены в приложении 12.

8.28.2 Масса спинок должна быть:

- спинка пластмассовая головная не более 3,5 кг
- спинка пластмассовая ножная не более 3,2 кг
- спинка металлическая не более 4,5 кг
- спинка металлическая с деревянной вставкой не более 5,5 кг.

8.29 Параметры торцевых опор

8.29.1 Масса торцевых опор должна быть:

- торец-опора металлическая с деревянной вставкой не более 7 кг;
- торец-опора металлическая не более 5,5 кг.

8.29.2 Габаритные размеры торцевых опор представлены в приложении 13.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Эксплуатация	Температура Влажность (без конденсации)	+10°C....+35° С 30%.....75%
Транспортировка и хранение	Температура Влажность (без конденсации)	-50°C....+40° С 75% при 15°C или 98% при 25°C

10 ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества кровати требованиям технических условий ТУ 32.50.30-001-27127705-2019 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В гарантию не входят поломки, возникшие по причине ненадлежащей эксплуатации.

По вопросам гарантийного или текущего ремонта обращаться к: Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 14.201-83	Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
ГОСТ 9.032-74	Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.104-79	Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 9.302-88	Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 9.303-84	Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования к выбору.
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы

	контроля
ГОСТ Р 51474-99	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1 общие требования
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности.
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы.
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
ГОСТ 19120	Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 22882-2010	Самоориентирующиеся колесики и колеса. Требования к самоориентирующимся колесикам для больничных кроватей

13 МАРКИРОВКА

13.1 Маркировка

Каждое изделие маркируется табличкой, выполненным печатным способом, прочно приклеенным к изделию. Маркировка должна содержать:

- наименование изделия по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица;
- дату изготовления;
- номер партии;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- обозначение ГОСТ 19917.

14 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитик» 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 30А, офис 204, тел. 8-800-200-21-32.

15 ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Приложение 1

I. Кровать медицинская, односекционная Rebq1 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-001-27127705-2019, варианты исполнений:

1. Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей, в составе: отдельная опора на колесах или отдельная опора на подпятниках или торец-опора на колесах или торец-опора на подпятниках; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq1-LOW000, Rebq1-LOW00B, Rebq1-LOW00S, Rebq1-LOW0C0, Rebq1-LOW0CB, Rebq1-LOW0CS, Rebq1-LOW0S0, Rebq1-LOW0SB, Rebq1-LOW0SS, Rebq1-LOW100, Rebq1-LOW10B, Rebq1-LOW10S, Rebq1-LOW1S0, Rebq1-LOW1SB, Rebq1-LOW1SS, Rebq1-LOW1C0, Rebq1-LOW1CB, Rebq1-LOW1CS, Rebq1-LOB000, Rebq1-LOB00B, Rebq1-LOB00S, Rebq1-LOB0C0, Rebq1-LOB0CB, Rebq1-LOB0CS, Rebq1-LOB0S0, Rebq1-LOB0SB, Rebq1-LOB0SS, Rebq1-LOB100, Rebq1-LOB10B, Rebq1-LOB10S, Rebq1-LOB1S0, Rebq1-LOB1SB, Rebq1-LOB1SS, Rebq1-LOB1C0, Rebq1-LOB1CB, Rebq1-LOB1CS, Rebq1-LTW000, Rebq1-LTW00B, Rebq1-LTW00S, Rebq1-LTW0C0, Rebq1-LTW0CB, Rebq1-LTW0CS, Rebq1-LTW0S0, Rebq1-LTW0SB, Rebq1-LTW0SS, Rebq1-LTW100, Rebq1-LTW10B, Rebq1-LTW10S, Rebq1-LTW1S0, Rebq1-LTW1SB, Rebq1-LTW1SS, Rebq1-LTW1C0, Rebq1-LTW1CB, Rebq1-LTW1CS, Rebq1-LTB000, Rebq1-LTB00B, Rebq1-LTB00S, Rebq1-LTB0C0, Rebq1-LTB0CB, Rebq1-LTB0CS, Rebq1-LTB0S0, Rebq1-LTB0SB, Rebq1-LTB0SS, Rebq1-LTB100, Rebq1-LTB10B, Rebq1-LTB10S, Rebq1-LTB1S0, Rebq1-LTB1SB, Rebq1-LTB1SS, Rebq1-LTB1C0, Rebq1-LTB1CB, Rebq1-LTB1CS.

2. Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки, в составе: отдельная опора на колесах или отдельная опора на подпятниках или торец-опора на колесах или торец-опора на подпятниках; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq1-NOW000, Rebq1-NOW00B, Rebq1-NOW00S, Rebq1-NOW0C0, Rebq1-NOW0CB, Rebq1-NOW0CS, Rebq1-NOW0S0, Rebq1-NOW0SB, Rebq1-NOW0SS, Rebq1-NOW100, Rebq1-NOW10B, Rebq1-NOW10S, Rebq1-NOW1S0, Rebq1-NOW1SB, Rebq1-NOW1SS, Rebq1-NOW1C0, Rebq1-NOW1CB, Rebq1-NOW1CS, Rebq1-NOB000, Rebq1-NOB00B, Rebq1-NOB00S, Rebq1-NOB0C0, Rebq1-NOB0CB, Rebq1-NOB0CS, Rebq1-NOB0S0, Rebq1-NOB0SB, Rebq1-NOB0SS, Rebq1-NOB100, Rebq1-NOB10B, Rebq1-NOB10S, Rebq1-NOB1S0, Rebq1-NOB1SB, Rebq1-NOB1SS, Rebq1-NOB1C0, Rebq1-NOB1CB, Rebq1-NOB1CS, Rebq1-NTW000, Rebq1-NTW00B, Rebq1-NTW00S, Rebq1-NTW0C0, Rebq1-NTW0CB, Rebq1-NTW0CS, Rebq1-NTW0S0, Rebq1-NTW0SB, Rebq1-NTW0SS, Rebq1-NTW100, Rebq1-NTW10B, Rebq1-NTW10S, Rebq1-NTW1S0, Rebq1-NTW1SB, Rebq1-NTW1SS, Rebq1-NTW1C0, Rebq1-NTW1CB, Rebq1-NTW1CS, Rebq1-NTB000, Rebq1-NTB00B, Rebq1-NTB00S, Rebq1-NTB0C0, Rebq1-NTB0CB, Rebq1-NTB0CS, Rebq1-NTB0S0, Rebq1-NTB0SB, Rebq1-NTB0SS, Rebq1-NTB100, Rebq1-NTB10B, Rebq1-NTB10S, Rebq1-NTB1S0, Rebq1-NTB1SB, Rebq1-NTB1SS, Rebq1-NTB1C0, Rebq1-NTB1CB, Rebq1-NTB1CS.

3. Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа, в составе: отдельная опора на колесах или отдельная опора на подпятниках или торец-опора на колесах или торец-опора на подпятниках; с поручнем или без; со стойкой для капельницы из нержавеющей стали или со стойкой для капельницы из покрашенной стали или без стойки; с устройством для подтягивания в виде стойки, или в виде лестницы или без устройства для подтягивания, варианты исполнений: Rebq1-HOW000, Rebq1-HOW00B, Rebq1-HOW00S, Rebq1-HOW0C0, Rebq1-HOW0CB, Rebq1-HOW0CS, Rebq1-HOW0S0, Rebq1-HOW0SB, Rebq1-HOW0SS, Rebq1-HOW100, Rebq1-HOW10B, Rebq1-HOW10S, Rebq1-HOW1S0, Rebq1-HOW1SB, Rebq1-HOW1SS, Rebq1-HOW1C0, Rebq1-HOW1CB, Rebq1-HOW1CS, Rebq1-HOB000, Rebq1-HOB00B, Rebq1-HOB00S, Rebq1-HOB0C0, Rebq1-HOB0CB, Rebq1-HOB0CS, Rebq1-HOB0S0, Rebq1-HOB0SB, Rebq1-HOB0SS, Rebq1-HOB100, Rebq1-HOB10B, Rebq1-HOB10S, Rebq1-HOB1S0, Rebq1-HOB1SB, Rebq1-HOB1SS, Rebq1-HOB1C0, Rebq1-HOB1CB,

Rebq1-HOB1CS, Rebq1-HTW000, Rebq1-HTW00B, Rebq1-HTW00S, Rebq1-HTW0C0, Rebq1-HTW0CB, Rebq1-HTW0CS, Rebq1-HTW0S0, Rebq1-HTW0SB, Rebq1-HTW0SS, Rebq1-HTW100, Rebq1-HTW10B, Rebq1-HTW10S, Rebq1-HTW1S0, Rebq1-HTW1SB, Rebq1-HTW1SS, Rebq1-HTW1C0, Rebq1-HTW1CB, Rebq1-HTW1CS, Rebq1-HTB000, Rebq1-HTB00B, Rebq1-HTB00S, Rebq1-HTB0C0, Rebq1-HTB0CB, Rebq1-HTB0CS, Rebq1-HTB0S0, Rebq1-HTB0SB, Rebq1-HTB0SS, Rebq1-HTB100, Rebq1-HTB10B, Rebq1-HTB10S, Rebq1-HTB1S0, Rebq1-HTB1SB, Rebq1-HTB1SS, Rebq1-HTB1C0, Rebq1-HTB1CB, Rebq1-HTB1CS.

II. Принадлежности:

1. Полка;
2. Центральный тормоз;
3. Столик пластиковый;
4. Столик деревянный;
5. Крючок-держатель.

Приложение 2
Комплект поставки

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт
I	Кровать медицинская, односекционная Rebq1 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-001-27127705-2019, варианты исполнений:	
1.	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW000, в составе:	
1.1	Опора на колесах	2
1.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
2.	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW00B, в составе:	
2.1	Опора на колесах	2
2.2	Устройство для подтягивания	1
2.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
3.	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW00S, в составе:	
3.1	Опора на колесах	2
3.2	Лестница для подтягивания	1
3.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
4	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW0C0, в составе:	
4.1	Опора на колесах	2
4.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
4.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
5	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW0CB, в составе:	
5.1	Опора на колесах	2
5.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
5.3	Устройство для подтягивания	1
5.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
6	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW0CS, в составе:	
6.1	Опора на колесах	2
6.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
6.3	Лестница для подтягивания	1
6.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
7	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW0S0, в составе:	
7.1	Опора на колесах	2
7.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
7.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
8	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW0SB, в составе:	
8.1	Опора на колесах	2
8.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
8.3	Устройство для подтягивания	1

8.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
9	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW0SS, в составе:	
9.1	Опора на колесах	2
9.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
9.3	Лестница для подтягивания	1
9.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
10	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW100, в составе:	
10.1	Опора на колесах	2
10.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
10.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
11	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW10B, в составе:	
11.1	Опора на колесах	2
11.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
11.3	Устройство для подтягивания	1
11.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
12	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW10S, в составе:	
12.1	Опора на колесах	2
12.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
12.3	Лестница для подтягивания	1
12.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
13	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW1S0, в составе:	
13.1	Опора на колесах	2
13.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
13.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
13.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
14	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOW1SB, в составе:	
14.1	Опора на колесах	2
14.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
14.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
14.4	Устройство для подтягивания	1
14.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка	2

	металлическая с деревянной вставкой	
15	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOWISS, в составе:	
15.1	Опора на колесах	2
15.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
15.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
15.4	Лестница для подтягивания	1
15.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
16	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOWIC0, в составе:	
16.1	Опора на колесах	2
16.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
16.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
16.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
17	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOWICB, в составе:	
17.1	Опора на колесах	2
17.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
17.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
17.4	Устройство для подтягивания	1
17.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
18	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOWICS, в составе:	
18.1	Опора на колесах	2
18.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
18.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
18.4	Лестница для подтягивания	1
18.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
19	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB000, в составе:	
19.1	Опора на подпятниках	2
19.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
20	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB00B, в составе:	
20.1	Опора на колесах	2
20.2	Устройство для подтягивания	1
20.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
21	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB00S, в составе:	

21.1	Опора на подпятниках	2
21.2	Лестница для подтягивания	1
21.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
22	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB0C0, в составе:	
22.1	Опора на подпятниках	2
22.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
22.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
23	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB0CB, в составе:	
23.1	Опора на подпятниках	2
23.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
23.3	Устройство для подтягивания	1
23.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
24	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB0CS, в составе:	
24.1	Опора на подпятниках	2
24.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
24.3	Лестница для подтягивания	1
24.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
25	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB0S0, в составе:	
25.1	Опора на подпятниках	2
25.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
25.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
26	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB0SB, в составе:	
26.1	Опора на подпятниках	2
26.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
26.3	Устройство для подтягивания	1
26.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
27	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB0SS, в составе:	
27.1	Опора на подпятниках	2
27.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
27.3	Лестница для подтягивания	1
27.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
28	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB100, в составе:	
28.1	Опора на подпятниках	2
28.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
28.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
29	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных	

	ламелей Rebq1-LOB10B, в составе:	
29.1	Опора на подпятниках	2
29.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
29.3	Устройство для подтягивания	1
29.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
30	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB10S, в составе:	
30.1	Опора на подпятниках	2
30.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
30.3	Лестница для подтягивания	1
30.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
31	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB1S0, в составе:	
31.1	Опора на подпятниках	2
31.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
31.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
31.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
32	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB1SB, в составе:	
32.1	Опора на подпятниках	2
32.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
32.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
32.4	Устройство для подтягивания	1
32.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
33	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB1SS, в составе:	
33.1	Опора на подпятниках	2
33.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
33.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
33.4	Лестница для подтягивания	1
33.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
34	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB1C0, в составе:	
34.1	Опора на подпятниках	2
34.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
34.3	Стойка для капельницы из окрашенной стали	1

34.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
35	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB1CB, в составе:	
35.1	Опора на подпятниках	2
35.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
35.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
35.4	Устройство для подтягивания	1
35.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
36	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LOB1CS, в составе:	
36.1	Опора на подпятниках	2
36.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
36.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
36.4	Лестница для подтягивания	1
36.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
37.	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW000, в составе:	
37.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
38.	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW00B, в составе:	
38.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
38.2	Устройство для подтягивания	1
39.	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW00S, в составе:	
39.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
39.2	Лестница для подтягивания	1
40	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW0C0, в составе:	
40.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
40.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
41	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW0CB, в составе:	
41.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
41.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
41.3	Устройство для подтягивания	1
42	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW0CS, в составе:	
42.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
42.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
42.3	Лестница для подтягивания	1

43	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW0S0, в составе:	
43.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
43.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
44	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW0SB, в составе:	
44.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
44.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
44.3	Устройство для подтягивания	1
45	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW0SS, в составе:	
45.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
45.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
45.3	Лестница для подтягивания	1
46	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW100, в составе:	
46.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
46.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
47	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW10B, в составе:	
47.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
47.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
47.3	Устройство для подтягивания	1
48	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW10S, в составе:	
48.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
48.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
48.3	Лестница для подтягивания	1
49	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW1S0, в составе:	
49.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
49.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
49.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
50	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW1SB, в составе:	
50.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
50.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной	2

	поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	
50.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
50.4	Устройство для подтягивания	1
51	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW1SS, в составе:	
51.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
51.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
51.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
51.4	Лестница для подтягивания	1
52	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW1C0, в составе:	
52.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
52.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
52.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
53	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW1CB, в составе:	
53.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
53.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
53.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
53.4	Устройство для подтягивания	1
54	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTW1CS, в составе:	
54.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
54.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
54.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
54.4	Лестница для подтягивания	1
55	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB000, в составе:	
55.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
56	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB00B, в составе:	
56.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
56.2	Устройство для подтягивания	1
57	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB00S, в составе:	
57.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
57.2	Лестница для подтягивания	1

58	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB0C0, в составе:	
58.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
58.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
59	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB0CB, в составе:	
59.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
59.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
59.3	Устройство для подтягивания	1
60	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB0CS, в составе:	
60.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
60.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
60.3	Лестница для подтягивания	1
61	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB0S0, в составе:	
61.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
61.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
62	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB0SB, в составе:	
62.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
62.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
62.3	Устройство для подтягивания	1
63	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB0SS, в составе:	
63.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
63.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
63.3	Лестница для подтягивания	1
64	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB100, в составе:	
64.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
64.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
65	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB10B, в составе:	
65.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
65.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
65.3	Устройство для подтягивания	1
66	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB10S, в составе:	
66.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2

66.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
66.3	Лестница для подтягивания	1
67	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB1S0, в составе:	
67.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
67.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
67.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
68	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB1SB, в составе:	
68.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
68.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
68.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
68.4	Устройство для подтягивания	1
69	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB1SS, в составе:	
69.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
69.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
69.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
69.4	Лестница для подтягивания	1
70	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB1C0, в составе:	
70.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
70.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
70.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
71	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB1CB, в составе:	
71.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
71.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
71.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
71.4	Устройство для подтягивания	1
72	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальных ламелей Rebq1-LTB1CS, в составе:	
72.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
72.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

	большой поручень	
72.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
72.4	Лестница для подтягивания	1
73	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW000, в составе:	
73.1	Опора на колесах	2
73.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
74	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW00B, в составе:	
74.1	Опора на колесах	2
74.2	Устройство для подтягивания	1
74.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
75	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW00S, в составе:	
75.1	Опора на колесах	2
75.2	Лестница для подтягивания	1
75.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
76	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW0C0, в составе:	
76.1	Опора на колесах	2
76.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
76.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
77	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW0CB, в составе:	
77.1	Опора на колесах	2
77.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
77.3	Устройство для подтягивания	1
77.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
78	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW0CS, в составе:	
78.1	Опора на колесах	2
78.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
78.3	Лестница для подтягивания	1
78.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
79	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW0S0, в составе:	
79.1	Опора на колесах	2
79.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
79.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
80	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW0SB, в составе:	
80.1	Опора на колесах	2
80.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
80.3	Устройство для подтягивания	1
80.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

81	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW0SS, в составе:	
		2
81.1	Опора на колесах	1
81.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
81.3	Лестница для подтягивания	
81.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
82	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW100, в составе:	
		2
82.1	Опора на колесах	
82.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
82.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
83	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW10B, в составе:	
		2
83.1	Опора на колесах	
83.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
83.3	Устройство для подтягивания	1
83.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
84	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW10S, в составе:	
		2
84.1	Опора на колесах	
84.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
84.3	Лестница для подтягивания	1
84.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
85	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW1S0, в составе:	
		2
85.1	Опора на колесах	
85.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
85.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
85.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
86	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW1SB, в составе:	
		2
86.1	Опора на колесах	
86.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
86.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
86.4	Устройство для подтягивания	1
86.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
	я, односекционная с ложементом из стальной сетки	

	Rebq1-NOWISS, в составе:	
87.1	Опора на колесах	2
87.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
87.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
87.4	Лестница для подтягивания	1
87.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
88	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW1C0, в составе:	
88.1	Опора на колесах	2
88.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
88.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
88.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
89	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW1CB, в составе:	
89.1	Опора на колесах	2
89.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
89.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
89.4	Устройство для подтягивания	1
89.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
90	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOW1CS, в составе:	
90.1	Опора на колесах	2
90.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
90.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
90.4	Лестница для подтягивания	1
90.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
91	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB000, в составе:	
91.1	Опора на подпятниках	2
91.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
92	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB00B, в составе:	
92.1	Опора на подпятниках	2
92.2	Устройство для подтягивания	1
92.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
93	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB00S, в составе:	
93.1	Опора на подпятниках	2
93.2	Лестница для подтягивания	1

93.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
94	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB0C0, в составе:	
94.1	Опора на подпятниках	2
94.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
94.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
95	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB0CB, в составе:	
95.1	Опора на подпятниках	2
95.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
95.3	Устройство для подтягивания	1
95.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
96	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB0CS, в составе:	
96.1	Опора на подпятниках	2
96.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
96.3	Лестница для подтягивания	1
96.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
97	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB0S0, в составе:	
97.1	Опора на подпятниках	2
97.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
97.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
98	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB0SB, в составе:	
98.1	Опора на подпятниках	2
98.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
98.3	Устройство для подтягивания	1
98.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
99	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB0SS, в составе:	
99.1	Опора на подпятниках	2
99.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
99.3	Лестница для подтягивания	1
99.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
100	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB100, в составе:	
100.1	Опора на подпятниках	2
100.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
100.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
101	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB10B, в составе:	
101.1	Опора на подпятниках	2

101.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
101.3	Устройство для подтягивания	1
101.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
102	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB10S, в составе:	
102.1	Опора на подпятниках	2
102.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
102.3	Лестница для подтягивания	1
102.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
103	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB1S0, в составе:	
103.1	Опора на подпятниках	2
103.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
103.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
103.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
104	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB1SB, в составе:	
104.1	Опора на подпятниках	2
104.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
104.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
104.4	Устройство для подтягивания	1
104.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
105	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB1SS, в составе:	
105.1	Опора на подпятниках	2
105.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
105.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
105.4	Лестница для подтягивания	1
105.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
106	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB1C0, в составе:	
106.1	Опора на подпятниках	2
106.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
106.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
106.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

107	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB1CB, в составе:	
107.1	Опора на подпятниках	2
107.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
107.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
107.4	Устройство для подтягивания	1
107.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
108	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NOB1CS, в составе:	
108.1	Опора на подпятниках	2
108.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
108.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
108.4	Лестница для подтягивания	1
108.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
109	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW000, в составе:	
109.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
110	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW00B, в составе:	
110.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
110.2	Устройство для подтягивания	1
111	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW00S, в составе:	
111.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
111.2	Лестница для подтягивания	1
112	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW0C0, в составе:	
112.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
112.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
113	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW0CB, в составе:	
113.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
113.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
113.3	Устройство для подтягивания	1
114	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW0CS, в составе:	
114.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
114.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
114.3	Лестница для подтягивания	1
115	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW0S0, в составе:	

115.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
115.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
116	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW0SB, в составе:	
116.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
116.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
116.3	Устройство для подтягивания	1
117	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW0SS, в составе:	
117.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
117.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
117.3	Лестница для подтягивания	1
118	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW100, в составе:	
118.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
118.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
119	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW10B, в составе:	
119.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
119.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
119.3	Устройство для подтягивания	1
120	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW10S, в составе:	
120.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
120.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
120.3	Лестница для подтягивания	1
121	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW1S0, в составе:	
121.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
121.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
121.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
122	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW1SB, в составе:	
122.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
122.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2

122.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
122.4	Устройство для подтягивания	1
123	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW1SS, в составе:	
123.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
123.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
123.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
123.4	Лестница для подтягивания	1
124	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW1C0, в составе:	
124.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
124.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
124.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
125	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW1CB, в составе:	
125.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
125.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
125.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
125.4	Устройство для подтягивания	1
126	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTW1CS, в составе:	
126.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
126.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
126.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
126.4	Лестница для подтягивания	1
127	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB000, в составе:	
127.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
128	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB00B, в составе:	
128.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
128.2	Устройство для подтягивания	1
129	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB00S, в составе:	
129.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
129.2	Лестница для подтягивания	1
130	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB0C0, в составе:	

130.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
130.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
131	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB0CB, в составе:	
131.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
131.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
131.3	Устройство для подтягивания	1
132	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB0CS, в составе:	
132.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
132.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
132.3	Лестница для подтягивания	1
133	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB0SO, в составе:	
133.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
133.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
134	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB0SB, в составе:	
134.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
134.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
134.3	Устройство для подтягивания	1
135	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB0SS, в составе:	
135.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
135.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
135.3	Лестница для подтягивания	1
136	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB100, в составе:	
136.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
136.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
137	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB10B, в составе:	
137.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
137.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
137.3	Устройство для подтягивания	1
138	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB10S, в составе:	
138.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
138.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый	2

	большой поручень	
138.3	Лестница для подтягивания	1
139	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB1S0, в составе:	
139.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
139.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
139.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
140	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB1SB, в составе:	
140.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
140.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
140.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
140.4	Устройство для подтягивания	1
141	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB1SS, в составе:	
141.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
141.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
141.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
141.4	Лестница для подтягивания	1
142	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB1C0, в составе:	
142.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
142.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
142.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
143	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB1CB, в составе:	
143.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
143.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
143.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
143.4	Устройство для подтягивания	1
144	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-NTB1CS, в составе:	
144.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
144.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
144.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1

144.4	Лестница для подтягивания	1
145	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из стальной сетки Rebq1-HOW000, в составе:	
145.1	Опора на колесах	2
145.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
146	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW00B, в составе:	
146.1	Опора на колесах	2
146.2	Устройство для подтягивания	1
146.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
147	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW00S, в составе:	
147.1	Опора на колесах	2
147.2	Лестница для подтягивания	1
147.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
148	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW0C0, в составе:	
148.1	Опора на колесах	2
148.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
148.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
149	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW0CB, в составе:	
149.1	Опора на колесах	2
149.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
149.3	Устройство для подтягивания	1
149.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
150	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW0CS, в составе:	
150.1	Опора на колесах	2
150.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
150.3	Лестница для подтягивания	1
150.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
151	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW0S0, в составе:	
151.1	Опора на колесах	2
151.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
151.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
152	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW0SB, в составе:	
152.1	Опора на колесах	2
152.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
152.3	Устройство для подтягивания	1
152.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
153	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW0SS, в составе:	

153.1	Опора на колесах	2
153.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
153.3	Лестница для подтягивания	1
153.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
154	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW100, в составе:	
154.1	Опора на колесах	2
154.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
154.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
155	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW10B, в составе:	
155.1	Опора на колесах	2
155.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
155.3	Устройство для подтягивания	1
155.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
156	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW10S, в составе:	
156.1	Опора на колесах	2
156.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
156.3	Лестница для подтягивания	1
156.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
157	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW1S0, в составе:	
157.1	Опора на колесах	2
157.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
157.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
157.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
158	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW1SB, в составе:	
158.1	Опора на колесах	2
158.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
158.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
158.4	Устройство для подтягивания	1
158.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
159	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW1SS, в составе:	
159.1	Опора на колесах	2

159.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
159.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
159.4	Лестница для подтягивания	1
159.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
160	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW1C0, в составе:	
160.1	Опора на колесах	2
160.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
160.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
160.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
161	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW1CB, в составе:	
161.1	Опора на колесах	2
161.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
161.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
161.4	Устройство для подтягивания	1
161.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
162	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOW1CS, в составе:	
162.1	Опора на колесах	2
162.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
162.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
162.4	Лестница для подтягивания	1
162.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
163	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB000, в составе:	
163.1	Опора на подпятниках	2
163.2	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
164	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB00B, в составе:	
164.1	Опора на подпятниках	2
164.2	Устройство для подтягивания	1
164.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
165	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB00S, в составе:	
165.1	Опора на подпятниках	2
165.2	Лестница для подтягивания	1
165.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2

166	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB0C0, в составе:	
166.1	Опора на подпятниках	2
166.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
166.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
167	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB0CB, в составе:	
167.1	Опора на подпятниках	2
167.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
167.3	Устройство для подтягивания	1
167.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
168	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB0CS, в составе:	
168.1	Опора на подпятниках	2
168.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
168.3	Лестница для подтягивания	1
168.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
169	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB0S0, в составе:	
169.1	Опора на подпятниках	2
169.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
169.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
170	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB0SB, в составе:	
170.1	Опора на подпятниках	2
170.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
170.3	Устройство для подтягивания	1
170.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
171	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB0SS, в составе:	
171.1	Опора на подпятниках	2
171.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
171.3	Лестница для подтягивания	1
171.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
172	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB100, в составе:	
172.1	Опора на подпятниках	2
172.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
172.3	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
173	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB10B, в составе:	
173.1	Опора на подпятниках	2
173.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый	2

	большой поручень	
173.3	Устройство для подтягивания	1
173.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
174	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB10S, в составе:	
174.1	Опора на подпятниках	2
174.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
174.3	Лестница для подтягивания	1
174.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
175	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB1S0, в составе:	
175.1	Опора на подпятниках	2
175.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
175.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
175.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
176	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB1SB, в составе:	
176.1	Опора на подпятниках	2
176.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
176.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
176.4	Устройство для подтягивания	1
176.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
177	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB1SS, в составе:	
177.1	Опора на подпятниках	2
177.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
177.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
177.4	Лестница для подтягивания	1
177.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
178	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB1C0, в составе:	
178.1	Опора на подпятниках	2
178.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
178.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
178.4	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
179	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB1CB, в составе:	

179.1	Опора на подпятниках	2
179.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
179.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
179.4	Устройство для подтягивания	1
179.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
180	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HOB1CS, в составе:	
180.1	Опора на подпятниках	2
180.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
180.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
180.4	Лестница для подтягивания	1
180.5	Спинка пластмассовая* или спинка металлическая или спинка металлическая с деревянной вставкой	2
181	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW000, в составе:	
181.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
182	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW00B, в составе:	
182.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
182.2	Устройство для подтягивания	1
183	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW00S, в составе:	
183.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
183.2	Лестница для подтягивания	1
184	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW0C0, в составе:	
184.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
184.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
185	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW0CB, в составе:	
185.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
185.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
185.3	Устройство для подтягивания	1
186	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW0CS, в составе:	
186.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
186.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
186.3	Лестница для подтягивания	1
187	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW0S0, в составе:	
187.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2

187.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
188	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW0SB, в составе:	
188.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
188.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
188.3	Устройство для подтягивания	1
189	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW0SS, в составе:	
189.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
189.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
189.3	Лестница для подтягивания	1
190	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW100, в составе:	
190.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
190.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
191	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW10B, в составе:	
191.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
191.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
191.3	Устройство для подтягивания	1
192	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW10S, в составе:	
192.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
192.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
192.3	Лестница для подтягивания	1
193	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW1S0, в составе:	
193.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
193.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
193.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
194	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW1SB, в составе:	
194.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
194.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
194.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
194.4	Устройство для подтягивания	1

195	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW1SS, в составе:	
195.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
195.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
195.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
195.4	Лестница для подтягивания	1
196	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW1C0, в составе:	
196.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
196.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
196.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
197	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW1CB, в составе:	
197.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
197.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
197.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
197.4	Устройство для подтягивания	1
198	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTW1CS, в составе:	
198.1	Торец-опора металлическая на колесах или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на колесах	2
198.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
198.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
198.4	Лестница для подтягивания	1
199	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB000, в составе:	
199.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
200	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB00B, в составе:	
200.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
200.2	Устройство для подтягивания	1
201	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB00S, в составе:	
201.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
201.2	Лестница для подтягивания	1
202	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB0C0, в составе:	
202.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2

202.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
203	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ0СВ, в составе:	
203.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
203.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
203.3	Устройство для подтягивания	1
204	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ0СS, в составе:	
204.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
204.2	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
204.3	Лестница для подтягивания	1
205	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ0S0, в составе:	
205.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
205.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
206	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ0SB, в составе:	
206.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
206.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
206.3	Устройство для подтягивания	1
207	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ0SS, в составе:	
207.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
207.2	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
207.3	Лестница для подтягивания	1
208	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ100, в составе:	
208.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
208.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
209	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ10B, в составе:	
209.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
209.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
209.3	Устройство для подтягивания	1
210	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-НТВ10S, в составе:	
210.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
210.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
210.3	Лестница для подтягивания	1



211	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB1S0, в составе:	
211.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
211.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
211.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
212	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB1SB, в составе:	
212.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
212.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
212.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
212.4	Устройство для подтягивания	1
213	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB1SS, в составе:	
213.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
213.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
213.3	Стойка для капельницы из нержавеющей стали	1
213.4	Лестница для подтягивания	1
214	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB1C0, в составе:	
214.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
214.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
214.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
215	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB1CB, в составе:	
215.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
215.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
215.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
215.4	Устройство для подтягивания	1
216	Кровать медицинская, односекционная с ложементом из перфорированного стального листа Rebq1-HTB1CS, в составе:	
216.1	Торец-опора металлическая на подпятниках или торец-опора металлическая с деревянной вставкой на подпятниках	2
216.2	Поручень вставной или поручень с деревянной вставкой или складной поручень или пластмассовый малый поручень или пластмассовый большой поручень	2
216.3	Стойка для капельницы из покрашенной стали	1
216.4	Лестница для подтягивания	1
	Принадлежности:	

1	Полка	1
2	Центральный тормоз	1
3	Столик пластиковый	1
4	Столик деревянный	1
5	Крючок-держатель	1

4 - Спинка пластмассовая в составе: спинка пластмассовая головная – 1 шт., спинка пластмассовая ножная – 1 шт.



Приложение 3
Габаритные размеры

Кровать с опорой

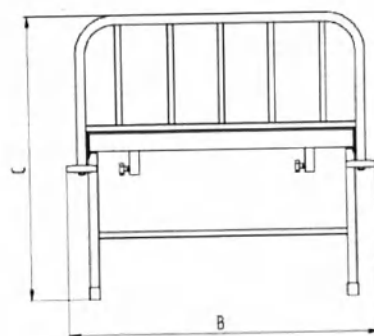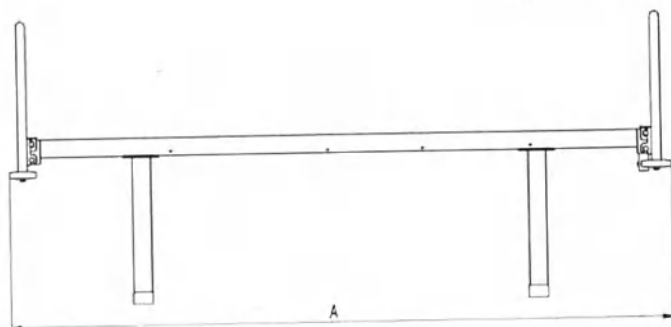

A	B	C
2230±5 мм	1042±5 мм	950±5 мм

Кровать с торцом-опорой

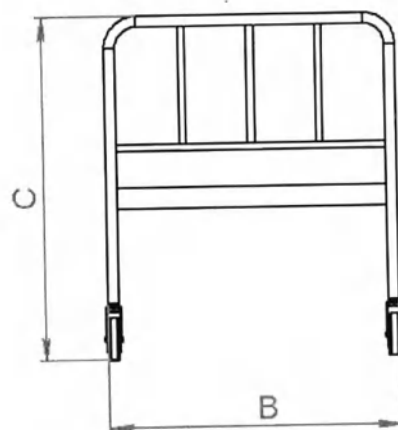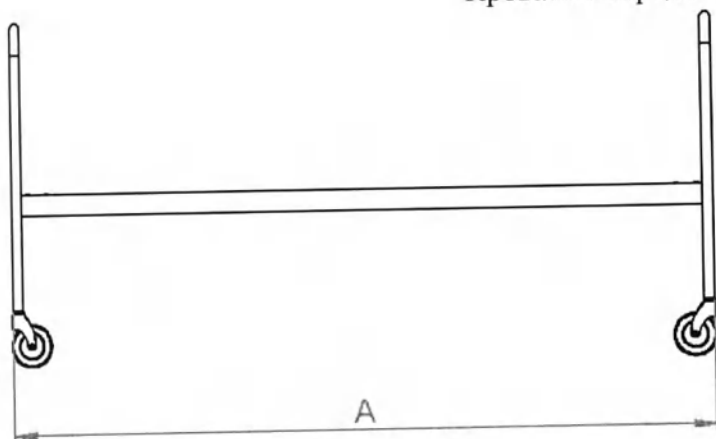


A	B	C
1960±5 мм	805±5 мм	950±5 мм

Приложение 4


Габаритные размеры

Поручень вставной

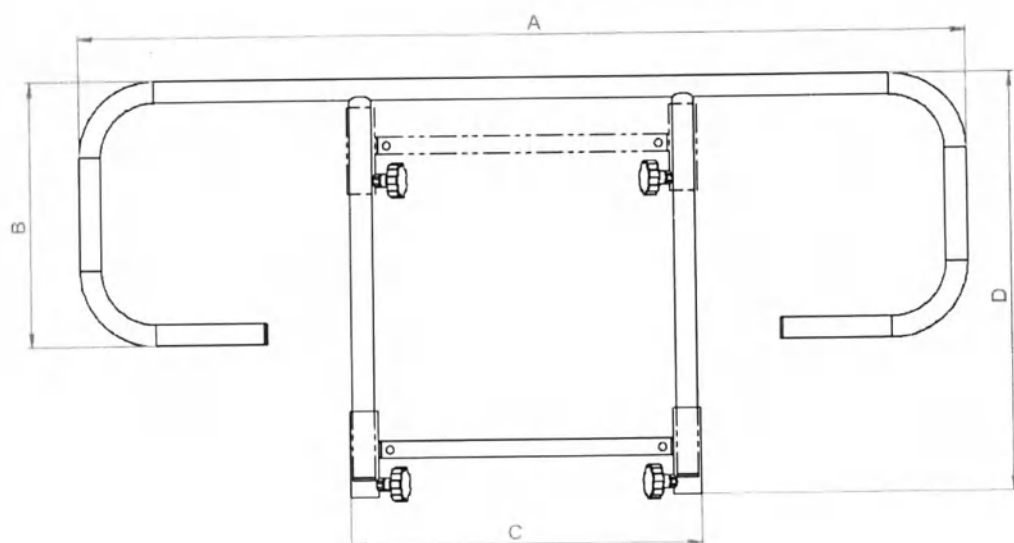


A	B	C	D
1025±2 мм	305±2 мм	405±2 мм	135±2÷485±2 мм

Поручень с деревянной вставкой

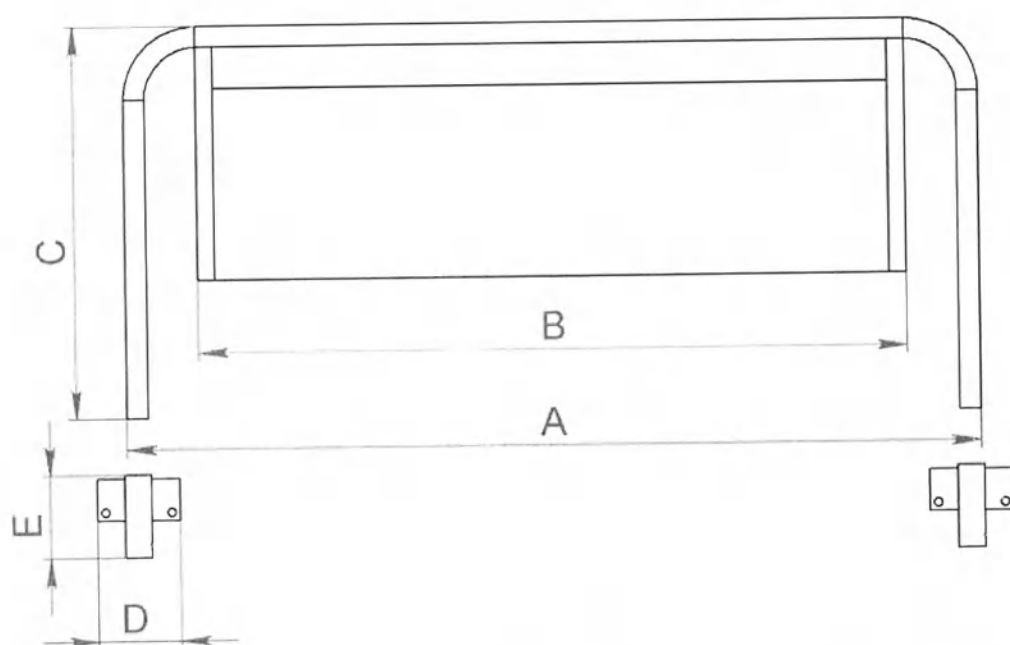


A	B	C	D	E
1025±2 мм	850±2 мм	470±2 мм	100±2 мм	100±2 мм

Складной поручень

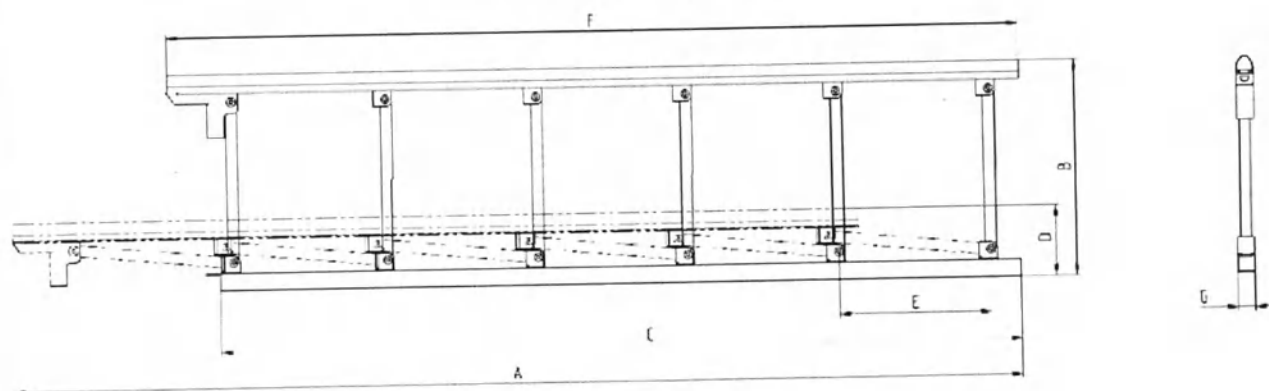


A	B	C	D	E	F	G
1747±5 мм	400±5 мм	1380±2 мм	120±5 мм	260±2 мм	1467±2 мм	30±2 мм

Пластмассовый малый поручень

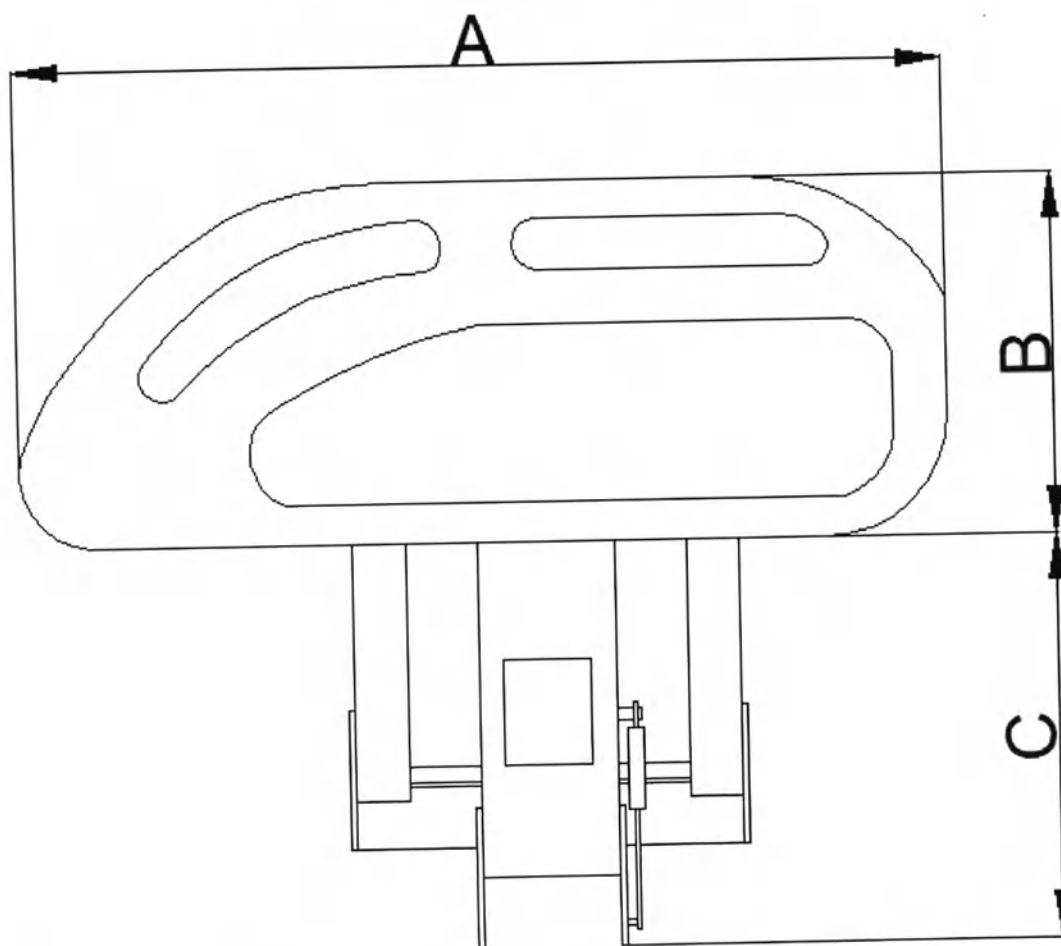

A	B	C
570±2 мм	280±2 мм	260±2 мм

Пластмассовый большой поручень


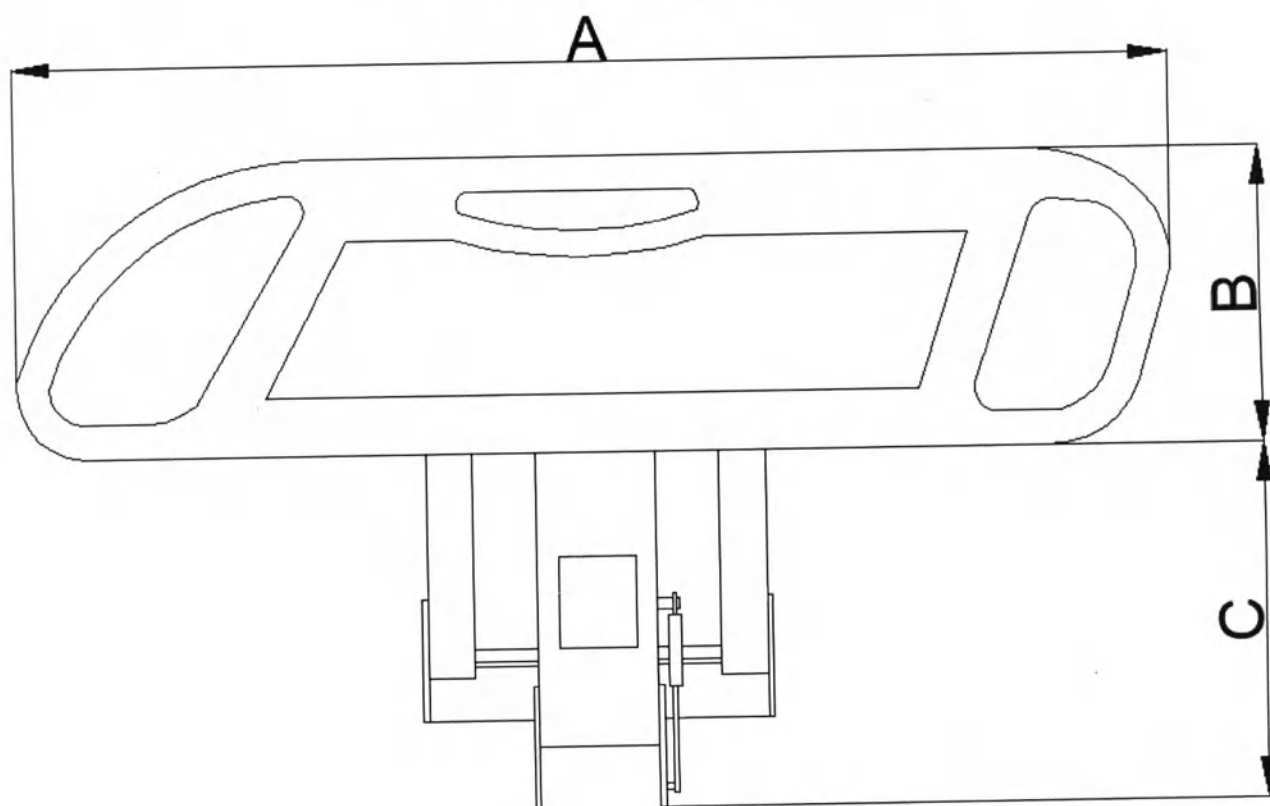


A	B	C
1000±2 мм	250±2 мм	250±2 мм

Приложение 5



Габаритные размеры

Стойка для капельницы из нержавеющей стали

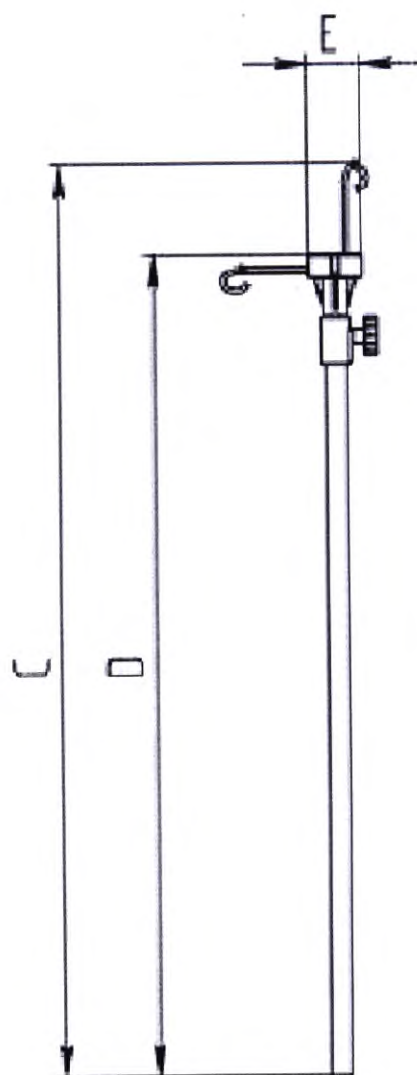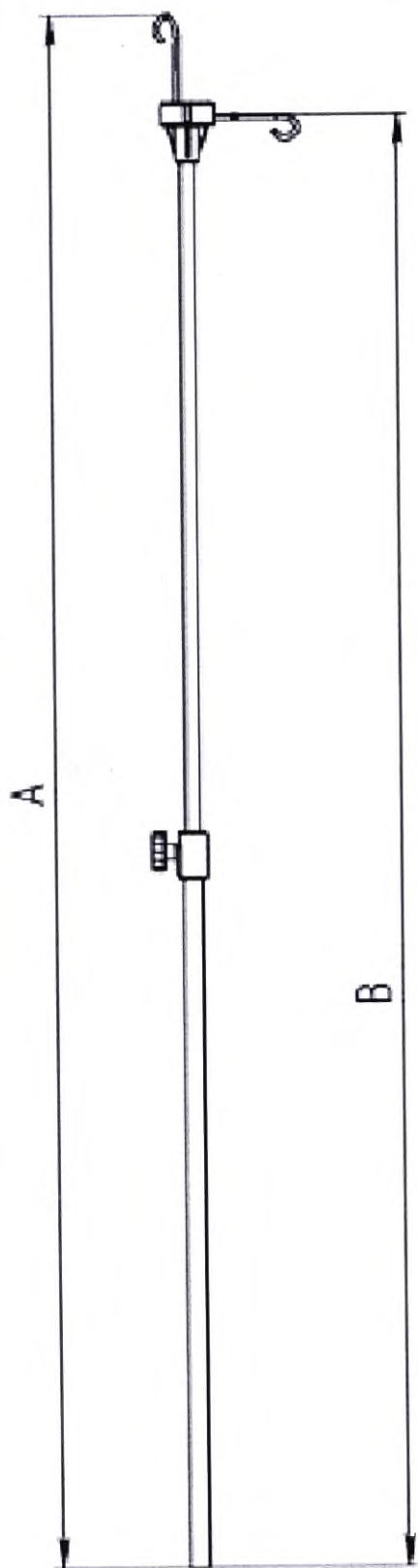

A	B	C	D	E
1485±5 мм	1390±5 мм	865±5 мм	775±5 мм	55±2 мм

Стойка для капельницы из покрашенной стали

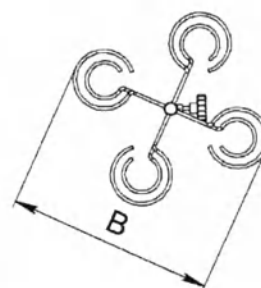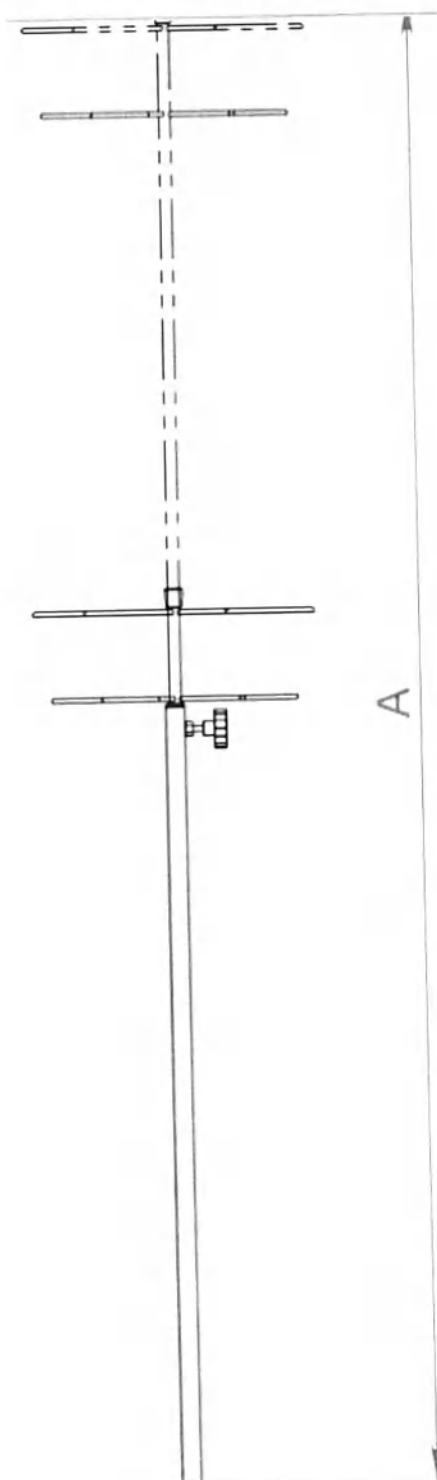


A	B
$930 \pm 5 \div 1510 \pm 5$ мм	305 ± 5 мм

Приложение 6

Габаритные размеры

Стойка для подтягивания

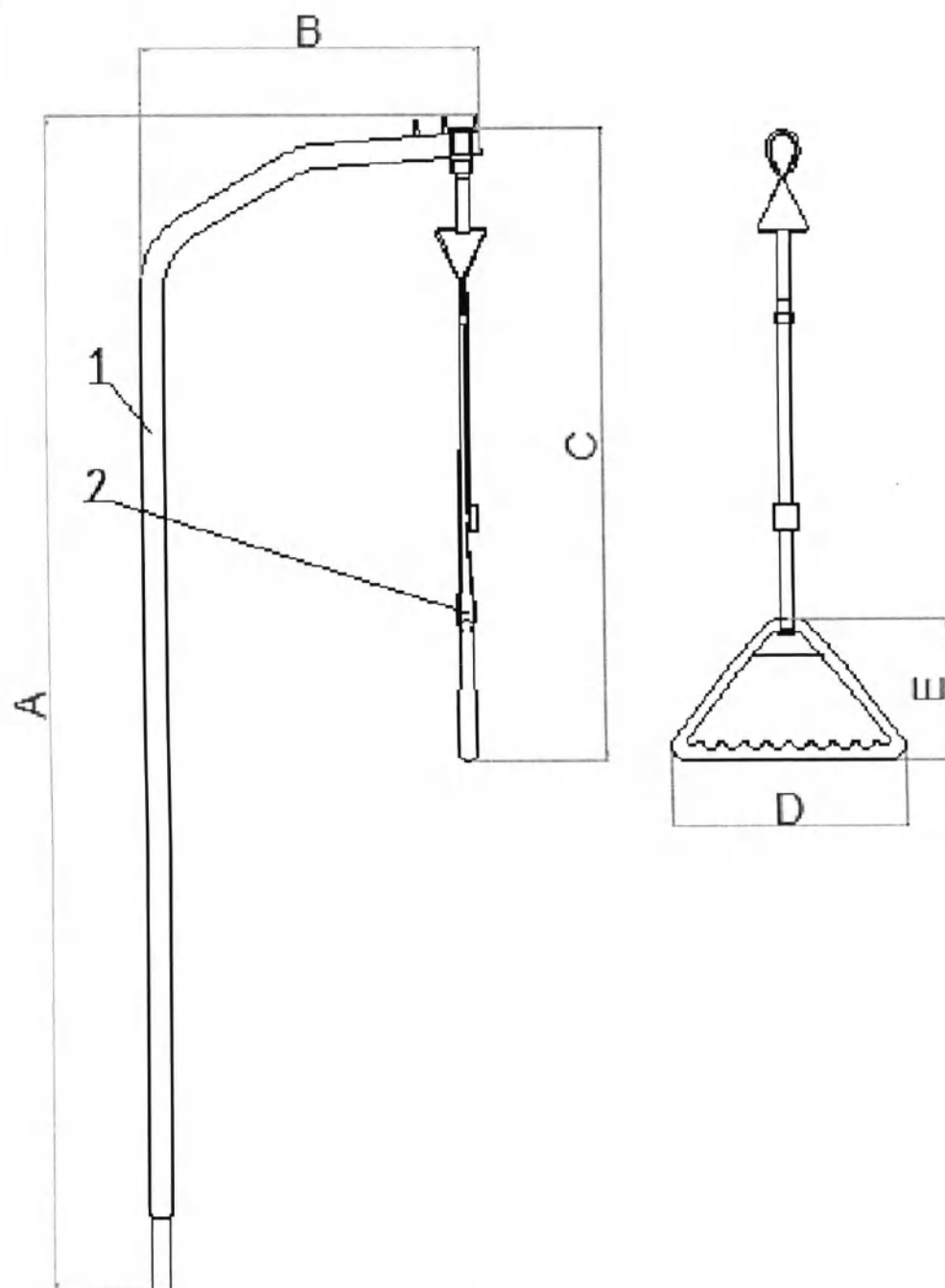


1 – Стойка подтягивания; 2 – Навесной элемент

A	B	C	D	E
1610±5 мм	470±5 мм	450±5÷980±5 мм	270±5 мм	195±5 мм

Приложение 7

Габаритные размеры

Лестница для подтягивания

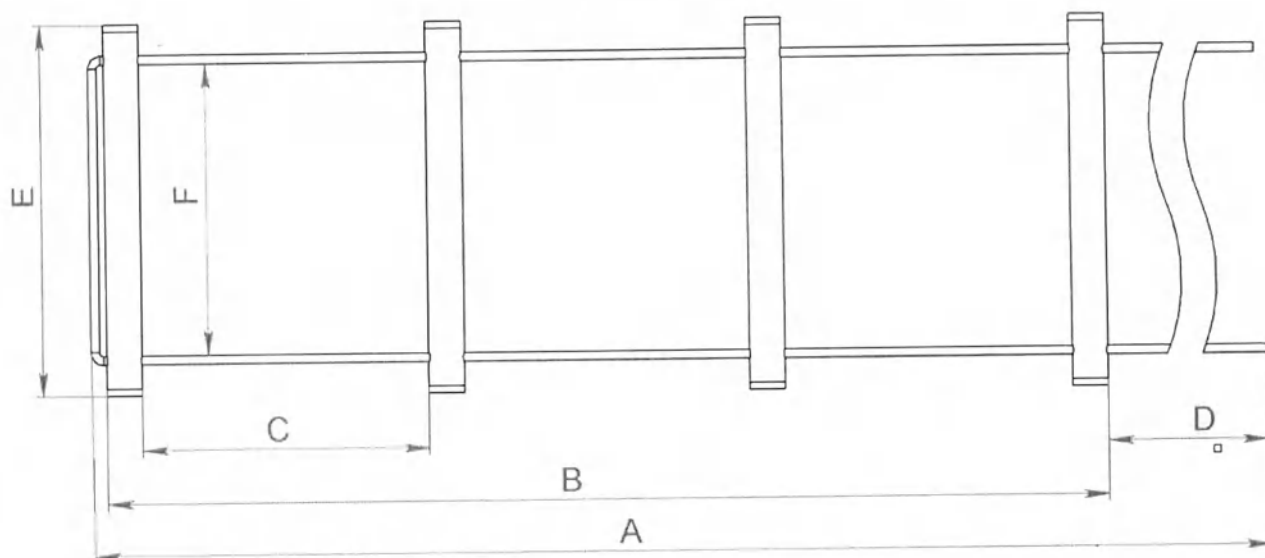


A	B	C	D	E	F
3155±5 мм	700±5 мм	200±5 мм	2445±5 мм	260±5 мм	204±5 мм

Приложение 8

Габаритные размеры

Полка

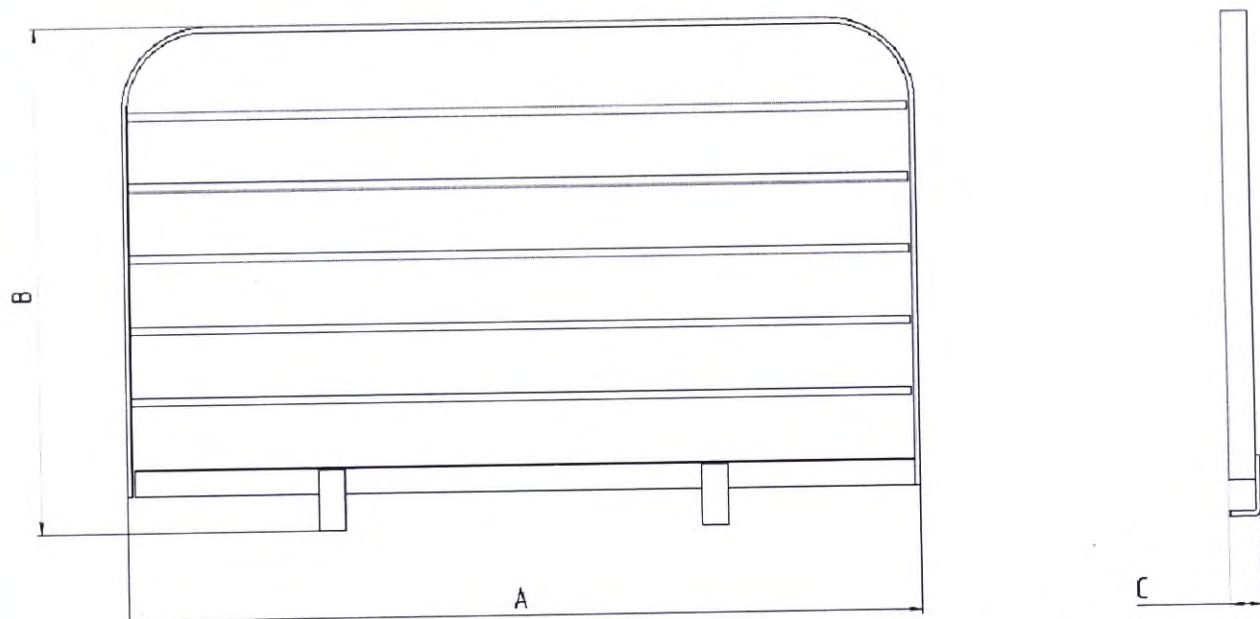


A	B	C
600±5 мм	383±5 мм	24±1 мм


Приложение 9

Схема центрального тормоза

1. Колесо Ø125 с трехпозиционной тормозной системой
2. Колесо Ø125 с двухпозиционной тормозной системой
3. Педаль
4. Эксцентрик
5. Прут (шестигранный)
6. Рычаг 28 мм
7. Винт М8

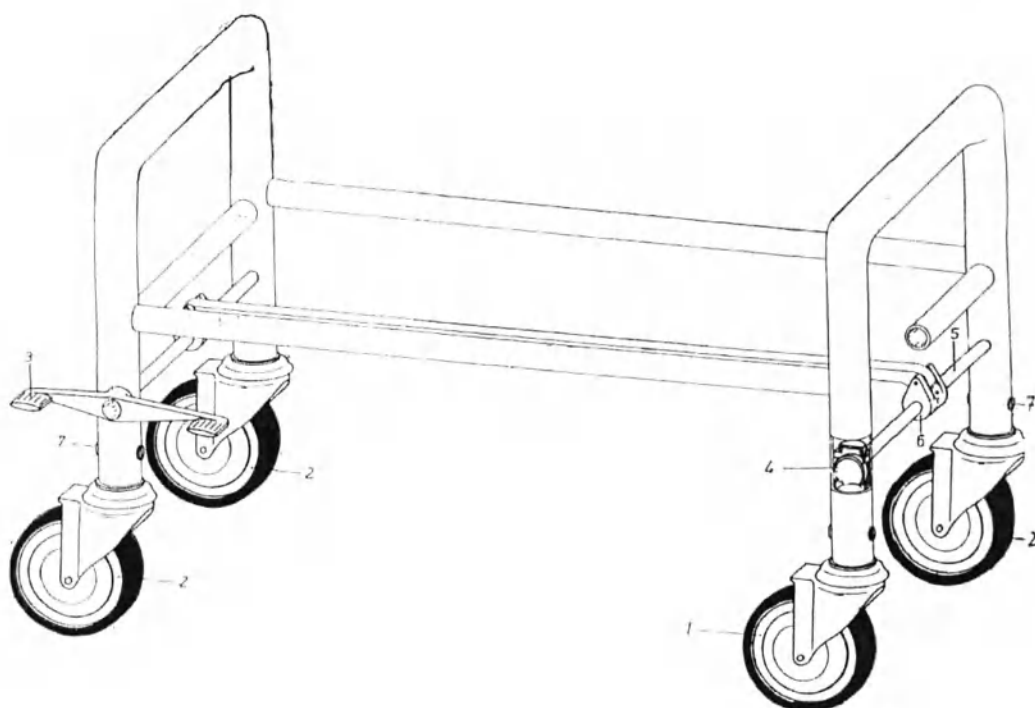

Приложение 10
Габаритные размеры
 Столик

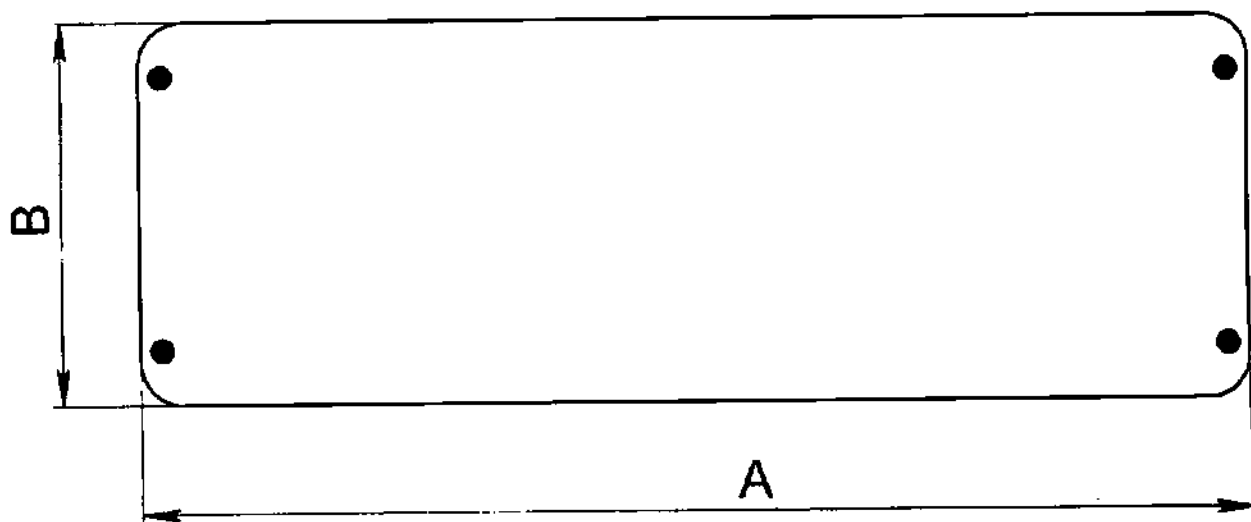


A	B	C
1020±2 мм	350±2 мм	39±2 мм

Приложение 11

Габаритные размеры

Крючок-держатель

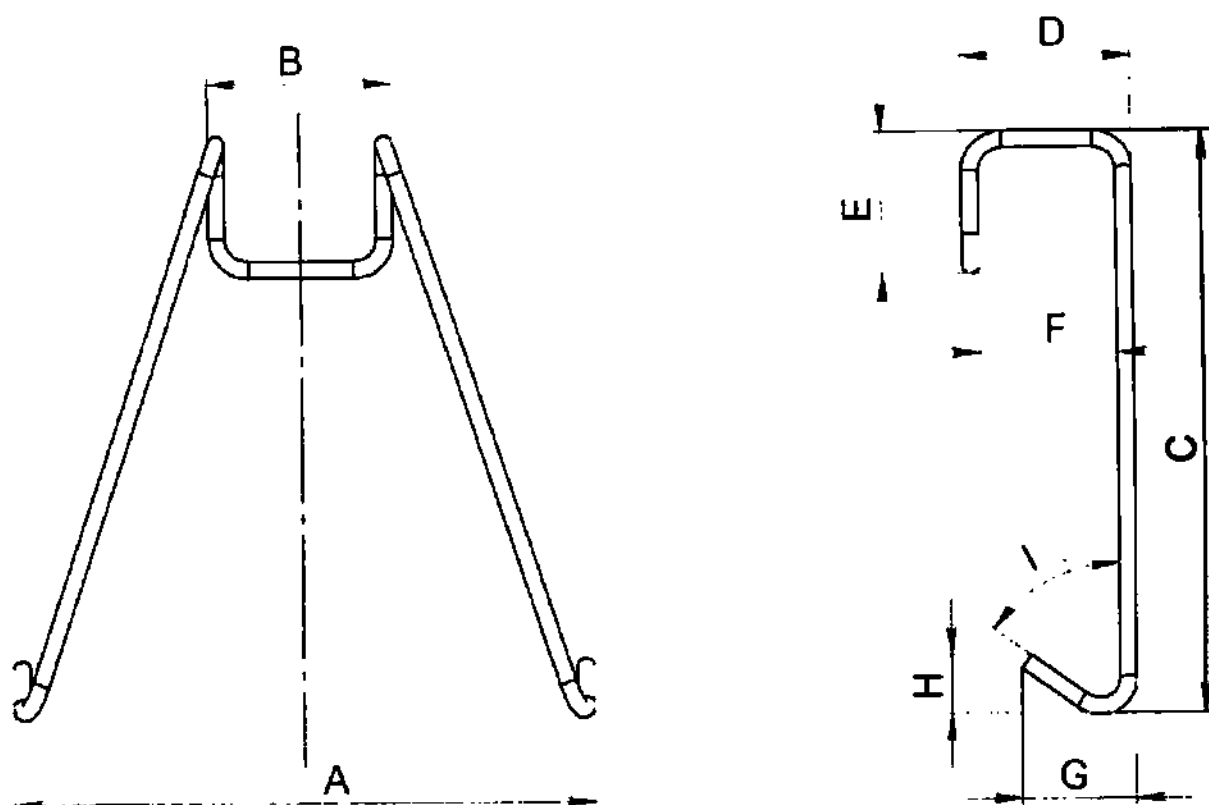


A	B	C	D	E	F	G	H	I
140±2	45±2	140±2	41±2	34±2	33±2	28±1	14±1	55°
MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	±5°

Приложение 12

Габаритные размеры

Пластиковая спинка

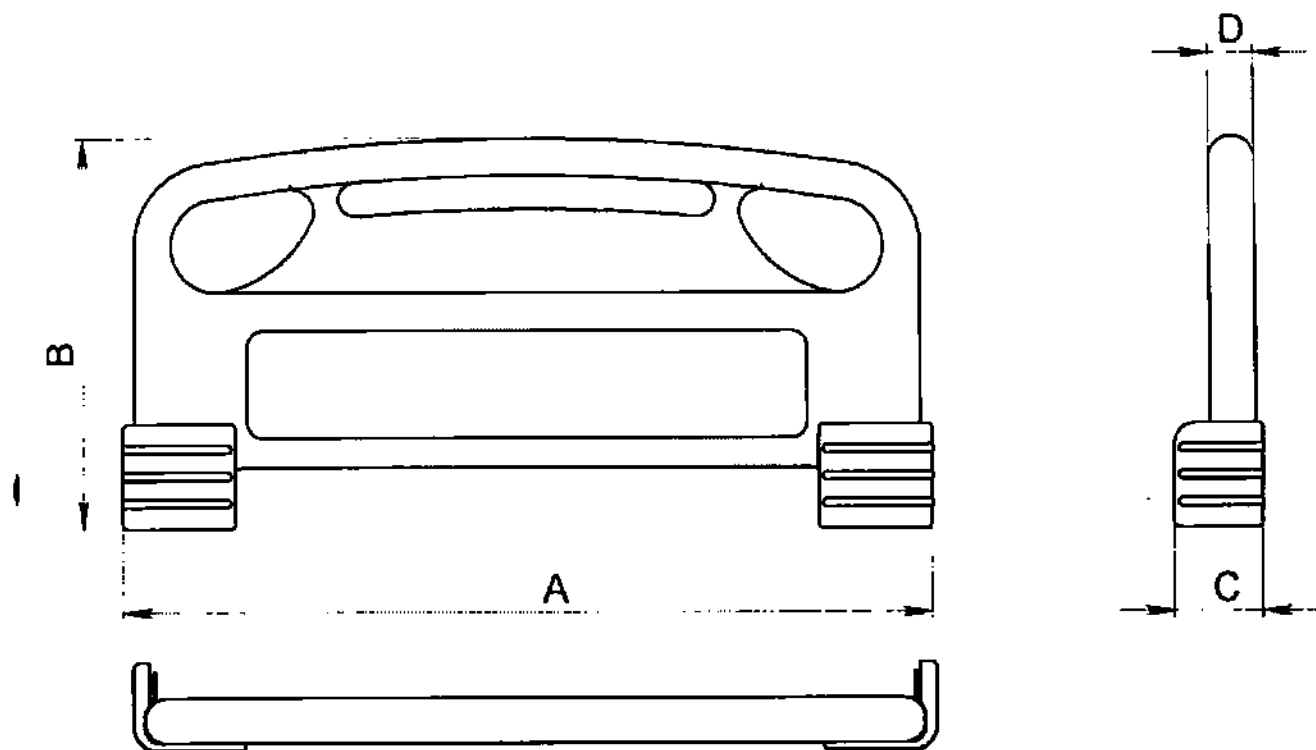


Размеры спинки пластмассовой головной

A	B	C	D
940±5 мм	525±5 мм	100±2 мм	50±2 мм

Размеры спинки пластмассовой ножной


A	B	C	D
940±5 мм	435±5 мм	100±2 мм	50±2 мм

Спинка металлическая

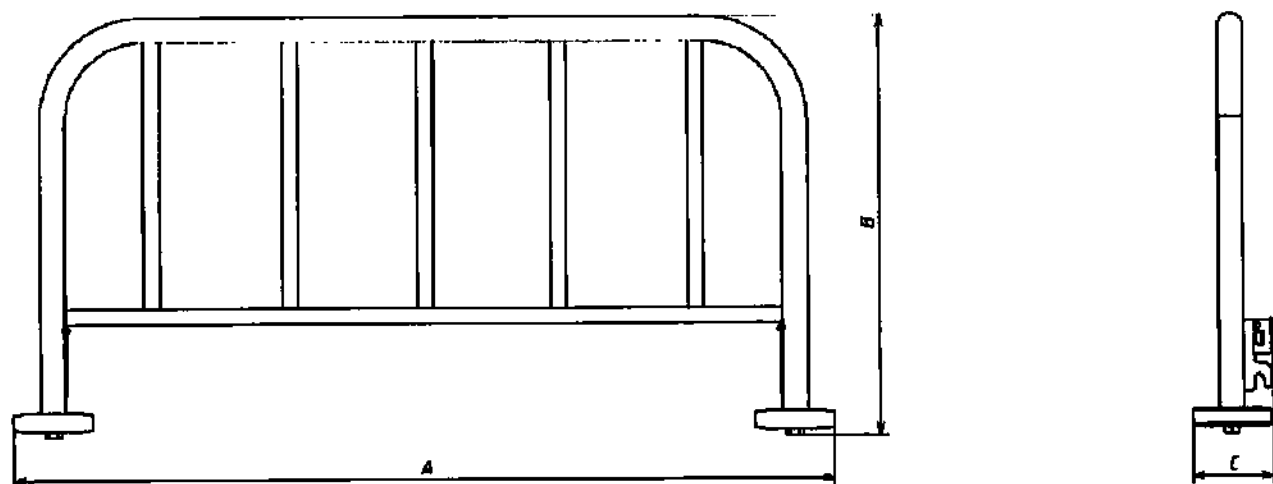

A	B	C
1042±5 мм	532±5 мм	102±4 мм

Спинка металлическая с деревянной вставкой

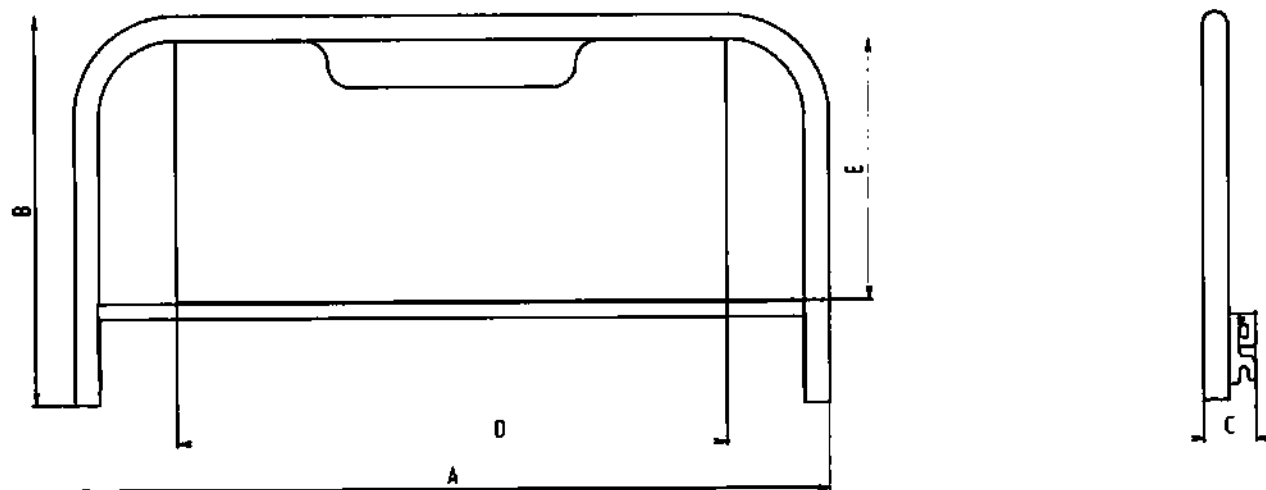


A	B	C	D	E
975±5 мм	500±5 мм	68±2 мм	710±5 мм	336±4 мм

Приложение 13


Габаритные размеры

Торец-опора металлическая с деревянной вставкой

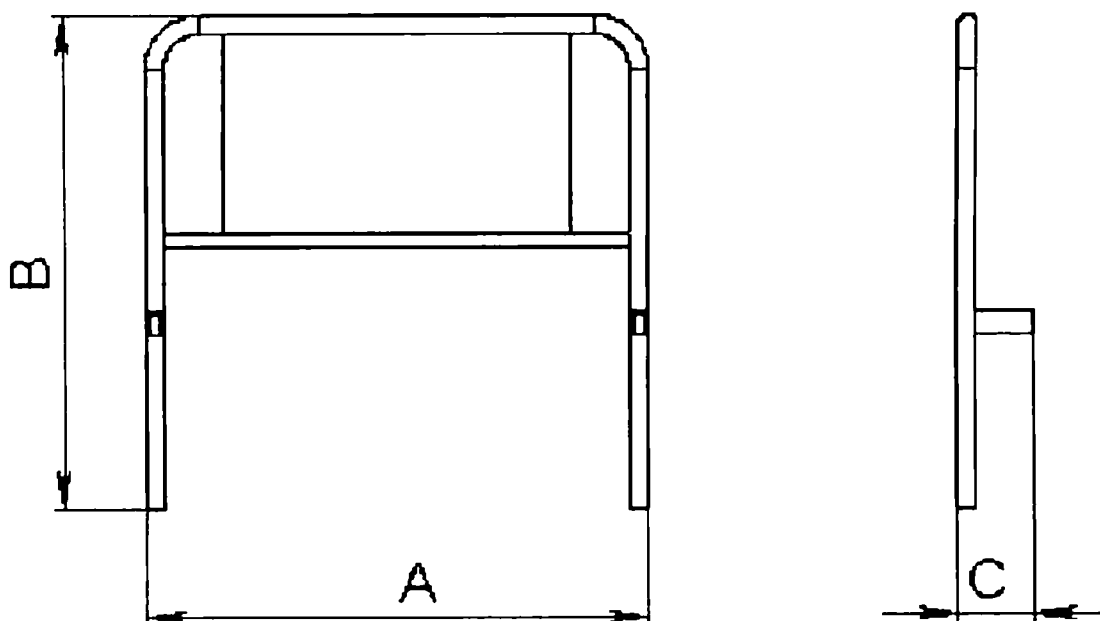

A	B	C
805±5 мм	950±5 мм	135±2 мм

Торец-опора металлическая

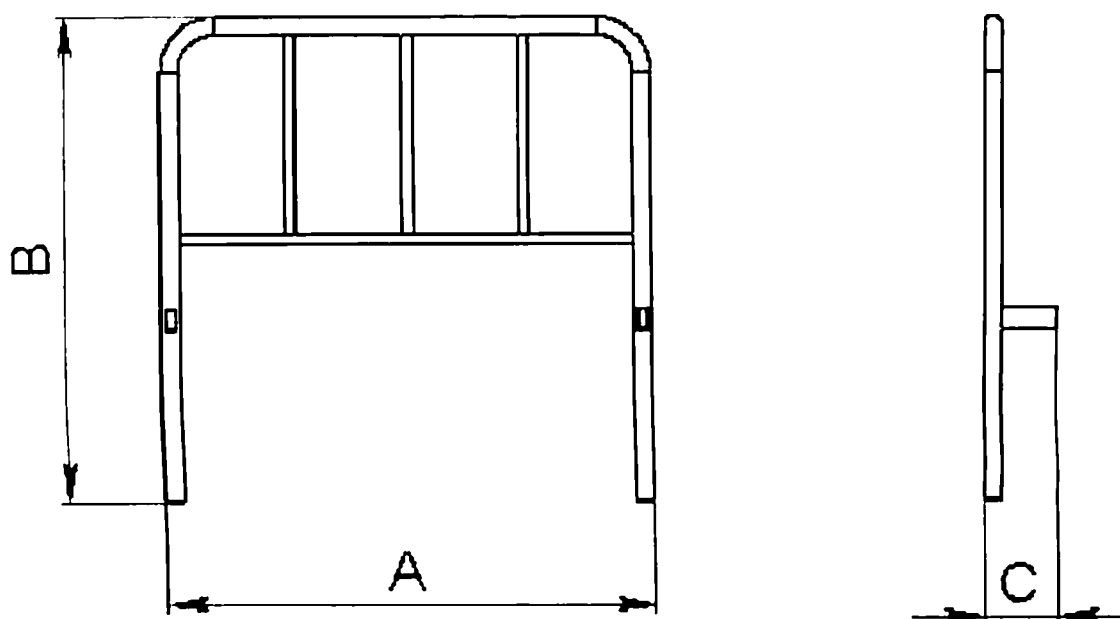

A	B	C
805±5 мм	950±5 мм	135±2 мм

ООО "РЕАБИЛИТИК"
Итого в настоящем документе

65 листа (ов)

Генеральный директор
Мухин А.А.

