

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ИМБИАН»



/Е.Н. Яценко/

« 14 » августа 2024 г.

Фотографические изображения общего вида

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для самотестирования «COVID-19 Ag self-test» по ТУ 21.20.23-066-39271034-2023

Серия № 240617

CORONA VIRUS
COVID-19 Ag self-test

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для самотестирования
no COVID-19 Ag self-test
по ТУ 21.20.23-066-39271034-2023

по ТУ 21.20.23-046-39271034-2023



1 TEST



Ташкент-энка, Министрлар ахборот маркази
 11 92 89 05 04 28 608 33 2020



ИНСТРУКЦИЯ по применению

**Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения антител
коронавируса SARS-CoV-2 в мазке
из нижнего носового входа для
самотестирования
«COVID-19 Ag self-test» no TY
21.20.23-066-39271034-2023**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового хода для самостестирования «COVID-19 Ag self-test» по ТУ 21.20.23-066-39271034-2023 (далее Экспресс-тест «COVID-19 Ag self-test»).

1. ПОДГОТОВКА ИССЛЕДОВАНИЮ

1.1. Условия проведения анализа
Анализ проводить при температуре от +15 до +30 °С и относительной влажности от 20 до 80 %.

1.2. Предварительные манипуляции

Перед проведением тестирования необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и строго ей следовать.

Перед проведением анализа вскрыть упаковку экспресс-теста извлечь все компоненты. Выдержать компоненты экспресс-теста при температуре от +15 до +30 °C не менее 30 мин не вскрывая тест-кассету.

Внимание! В процессе хранения и транспортирования буферного раствора допускается выпадение осадка, что не влияет на результат анализа.

Перед применением экспресс-теста


Буферный раствор



Тест-кассета




Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020, в составе: 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный, варианты исполнения: - зонд пластиковый (полипропилен), тампон хлопковый, длина: 150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)

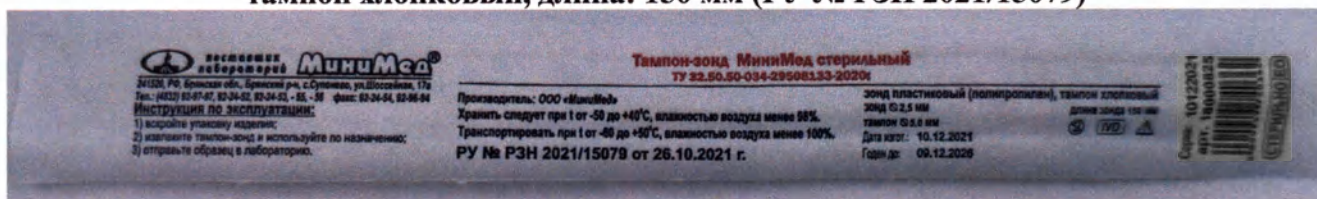


CORONA VIRUS

COVID-19 Ag self-test

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для самотестирования
«COVID-19 Ag self-test»
по ТУ 21.20.23-066-39271034-2023

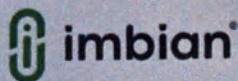

1 TEST

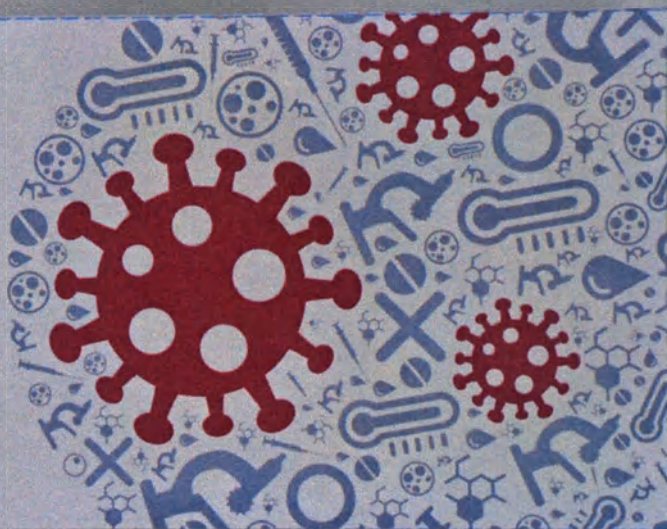

СОСТАВ НАБОРА:

Тест-кассета..... 1 шт.
Буферный раствор, 0,5 мл..... 1 шт.
Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020,
в составе: 1. Тампон-зонд МиниМед стерильный,
варианты исполнения: - зонд пластиковый
(полипропилен), тампон хлопковый, длина:
150 мм (РУ № РЗН 2021/15079)..... 1 шт.
Инструкция по применению..... 1 шт.
РУ №

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °C не более 10 суток.

Для самотестирования.
Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в перчатках.
Не использовать самостоятельно лицами в возрасте до 18 лет.



240617



2024-06-17



2027-06-17

Интерпретация результатов

C – контроль

T – антиген



Положительный
Появились две
полоски



Отрицательный
Появилась одна
полоска в верхней
части (контрольная зона)




CORONA VIRUS

COVID-19 Ag self-test





4 610240 911323

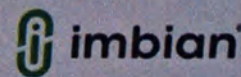


ООО «ИМБИАН»

630554, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1
+7 (383) 209-34-54; info@imbian.ru; www.imbian.ru

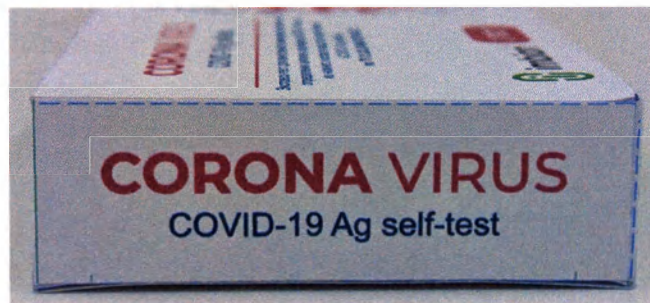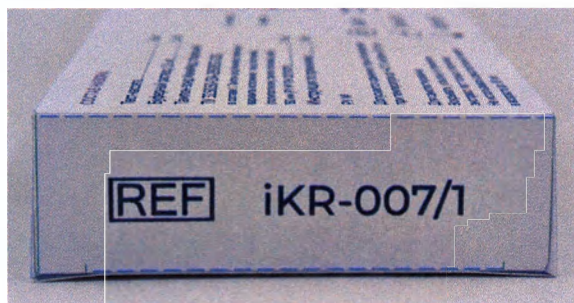

Состав поставки (транспортная упаковка + паспорт)

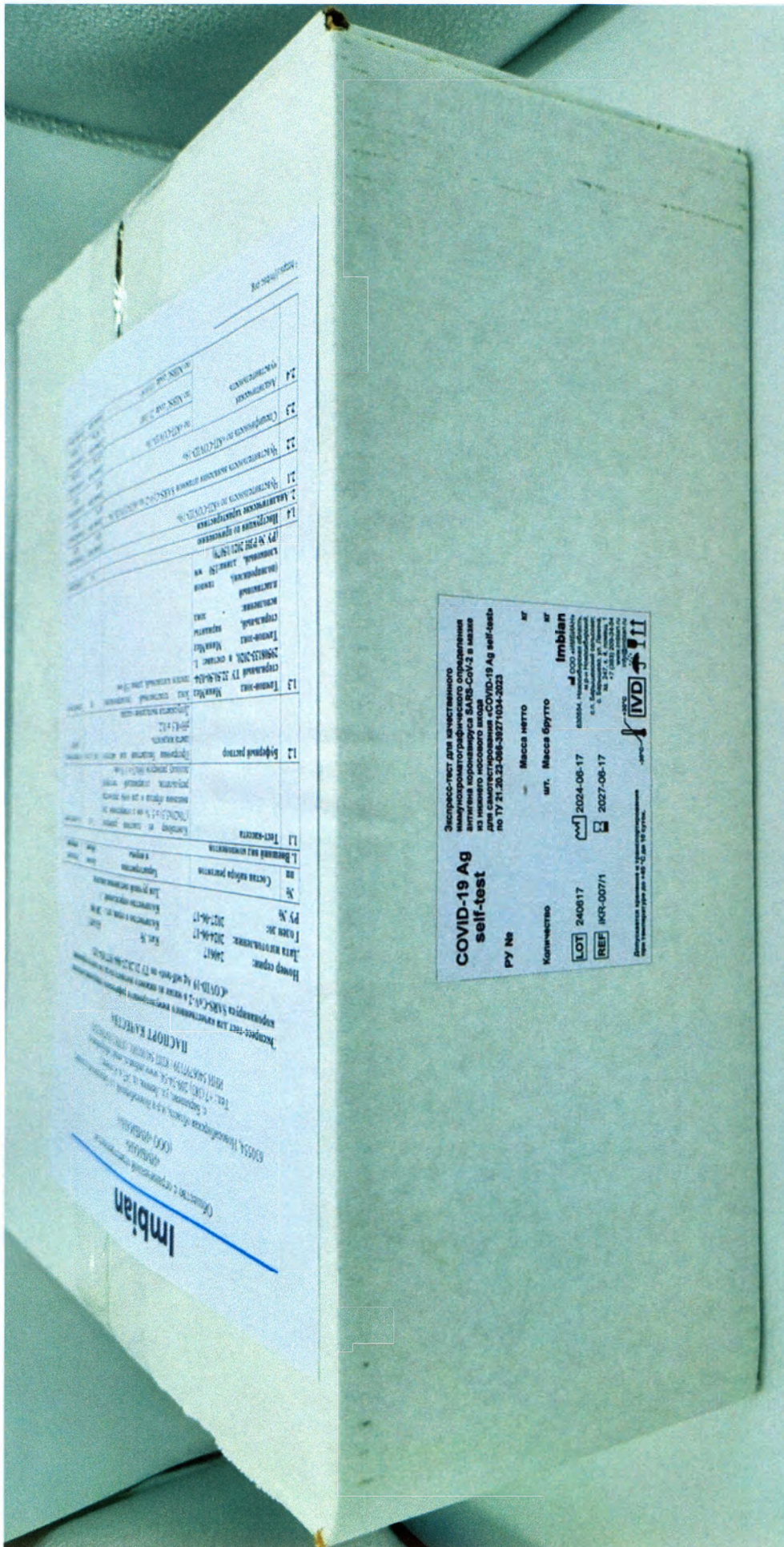

Прошнуровано, про
и скреплено печать
лист 8
Директор ООО «ИМ
Е.Н.
"20" 202

Е.Н. Яценко
2024 г.