

УТВЕРЖДАЮ



Индивидуальный
предприниматель
Гриневич Л. А.

«28» октября 2024г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ
по ТУ 30.99.10-001-0172742609-2023

ВВЕДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Правильное применение и регулярные осмотры – важный фактор эксплуатации изделия. Сохраните руководство на случай возникновения вопросов. Данное руководство изложено в ясной и краткой форме и предоставляют информацию, необходимую для безопасной эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация и обслуживание тележки должны производиться в соответствии с инструкциями, представленными в данном руководстве. Другие виды эксплуатации рассматриваются как несоответствующие техническим параметрам и могут причинить повреждения людям, изделию или имуществу.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тележка медицинская по ТУ 30.99.10–001–0172742609–2023, (далее – изделия, тележки).

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Тележка медицинская по ТУ 30.99.10–001–0172742609–2023,
в вариантах исполнения:

1. Тележка медицинская ТП-01 (артикулы 00-03), в составе:

- Ручка – 1 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 18 шт.;
- гайка М10 - 18 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Тележка медицинская ТП-02 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Тележка медицинская ТП-03 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съемное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Тележка медицинская ТП-04 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съемное – 2 шт.;

- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Тележка медицинская ТП-05 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съемное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Тележка медицинская ТП-06 (артикулы 00-03), в составе:

- Ограждение – 1 шт.;
- Ручка – 1 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.;
- болт М6х35 - 2 шт.;
- гайка М6 - 2 шт.;
- шайба М6 - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Тележка медицинская ТП-07 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съемное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Тележка медицинская ТП-08, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Тележка медицинская ТП-09, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Тележка медицинская ТП-10 (артикулы 00-02), в составе:

- Каркас – 1 шт.;

- Полка съемная – 2 шт.;
- Борт откидной – 2 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
- гайка М8 - 16 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Тележка медицинская ТБ-01 (артикулы 00-01), в составе:

- Основание – 1 шт.;
- Перегородка – 1 шт.;
- Ручка – 2 шт.;
- Крышка – 2 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Мешок съемный из ткани – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х35 - 8 шт.;
- гайка М6 - 8 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Тележка медицинская ТБ-02, в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Мешок съемный из ПВХ – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
- гайка М8 - 16 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Тележка медицинская ТБ-03, в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Мешок съемный из ПВХ – 2 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
- гайка М8 - 16 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Тележка медицинская ТБ-04 (артикулы 00-01), в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Тележка медицинская ТБ-05, в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Мешок съемный из ткани – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Тележка медицинская ТБ-06 (артикулы 00-03), в составе:

- Тележка в собранном виде - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Тележка медицинская ТБ-07, в составе:

- Основание – 1 шт.;

- Перегородка – 2 шт.;

- Дуга верхняя – 1 шт.;

- Крышка съемная – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;

- Мешок съемный из ткани – 1 шт.;

- Поддон съемный нижний – 1 шт.;

- Поддон съемный верхний – 1 шт.;

- Комплект крепежа, в составе:

- болт М6х35 - 8 шт.;

- гайка М6 - 8 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Тележка медицинская ТД-01 (артикулы 00-04), в составе:

- Каркас – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Тележка медицинская ТД-02 (артикулы 00-12), в составе:

- Каркас – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

20. Тележка медицинская ТД-03 (артикулы 00-12), в составе:

- Каркас – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

21. Тележка медицинская ТД-04 (артикулы 00-05), в составе:

- Ручка – 2 шт.;

- Корпус с ящиком – 1 шт.;

- Полка съемная – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;

- Комплект крепежа, в составе:

- болт М6х30 – 12 шт.;

- гайка М6 - 12 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

22. Тележка медицинская ТД-05 (артикулы 00-02), в составе:

- Ручка – 2 шт.;

- Полка съемная – 2 шт.;

- Корпус с ящиками – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;
- Рамка – 1 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х30 – 12 шт.;
- гайка М6 - 12 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка медицинская ТП-01 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-02 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-03 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-04 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-05 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-06 предназначена для транспортировки, размещения

медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-07 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-08 предназначена для транспортировки медицинских отходов к местам временного хранения и/или доставки инвентаря и расходных материалов в пределах медицинских учреждений.

Тележка медицинская ТП-09 предназначена для транспортировки медицинских отходов к местам временного хранения и/или доставки инвентаря и расходных материалов в пределах медицинских учреждений.

Тележка медицинская ТП-10 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТБ-01 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента в пределах отдела или больницы.

Тележка медицинская ТБ-02 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТБ-03 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных

медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТБ-04 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТБ-05 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, инструментов, перевязочных материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТБ-06 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках в смотровых и процедурных кабинетах, операционных и других специальных помещениях медицинской организации при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, а также для транспортировки медицинских отходов к местам временного хранения в пределах медицинских учреждений.

Тележка медицинская ТБ-07 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТД-01 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетах, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-02 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских

инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетов, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-03 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетов, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-04 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетов, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-05 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетов, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Медицинские организации.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Персонал в медицинских организациях, осуществляющий размещение, транспортировку и хранения медицинских изделий, оборудования и материалов, лекарственных средств, и бытовых отходов, в пределах отделения лечебного учреждения или больницы.

6. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тележка медицинская ТП-01 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-02 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение,

диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-03 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-04 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-05 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-06 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-07 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТП-08 предназначена для транспортировки медицинских отходов к местам временного хранения и/или доставки инвентаря и расходных материалов в пределах медицинских учреждений.

Тележка медицинская ТП-09 предназначена для транспортировки медицинских отходов к местам временного хранения и/или доставки инвентаря и расходных материалов в пределах медицинских учреждений.

Тележка медицинская ТП-10 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТБ-01 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента в пределах отдела или больницы.

Тележка медицинская ТБ-02 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТБ-03 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТБ-04 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента

Тележка медицинская ТБ-05 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, инструментов, перевязочных материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТБ-06 предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках в смотровых и процедурных кабинетах, операционных и других специальных помещениях медицинской организации при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, а также для транспортировки медицинских отходов к местам временного хранения в пределах медицинских учреждений.

Тележка медицинская ТБ-07 предназначена для транспортировки/поставки медицинских изделий, лекарственных средств, оборудования, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов в упаковках от центрального пункта снабжения или стерилизационного отделения к соответствующим зонам больницы (смотровые и процедурные кабинеты, палаты, операционные) для осуществления различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента, в том числе для ухода за лежачим пациентами.

Тележка медицинская ТД-01 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетах, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-02 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетах, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-03 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетах, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-04 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетах, направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

Тележка медицинская ТД-05 предназначена для транспортировки, размещения и хранения лекарственных средств, различных стерильных и нестерильных медицинских инструментов и материалов при осуществлении различных видов медицинской деятельности в стационарах, палатах, операционных, процедурных кабинетах,

направленных на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациентов.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Отсутствуют.

9. КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1 в соответствии с ГОСТ 31508, с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ Минздрава России № 4н от 06.06.2012г.).

10. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Тележки выпускаются следующих вариантов: ТП-01, ТП-02, ТП-03, ТП-04, ТП-05, ТП-06, ТП-07, ТП-08, ТП-09, ТП-10, ТБ-01, ТБ-02, ТБ-03, ТБ-04, ТБ-05, ТБ-06, ТБ-07, ТД-01, ТД-02, ТД-03, ТД-04, ТД-05 определяемых рабочими чертежами.

Тележка имеет составную двух-, трех- или четырёх- колёсную конструкцию, komponуемую на резьбовых и болтовых соединениях, с платформами, ящиками, полками, чехлами, ограждениями, столешницами, ручками для толкания. Конструкция должна обеспечивать их устойчивое фиксированное стояночное положение без опасности возникновения самопроизвольного движения на горизонтальной поверхности. Конструкция составных частей тележек должна предотвращать возможность их неправильной сборки. Конструктивное исполнение должно обеспечивать максимальное удобство технического обслуживания тележки.

Тележка на четырех колесах (два имеют тормоз): ТП-01, ТП-02, ТП-03, ТП-04, ТП-05, ТП-06, ТП-07, ТП-10, ТБ-01, ТБ-02, ТБ-03, ТБ-04, ТБ-05, ТД-01, ТД-02, ТД-03, ТД-04, ТД-05. Тележка на трех колесах: ТП-08, ТП-09. Тележка на двух колесах: ТБ-06.

Тележка ТБ-04 не имеет ручки для толкания.

Тележка ТП-01, ТП-02, ТП-03, ТП-04, ТП-05, ТП-06, ТП-07, ТП-10, ТБ-05 оснащена платформой, из них тележка ТП-03, ТП-04, ТП-05, ТП-07, ТП-10 имеет ограждения.

Тележка ТБ-02, ТБ-03, ТБ-04, ТБ-05, ТД-01, ТД-02, ТД-03, ТД-04, ТД-05 оснащена полками.

Тележка ТБ-07 оснащена поддонами.

Тележка ТД-04, ТД-05 оснащена выдвижными ящиками. Ручки тележки должны быть выполнены в виде замкнутого контура.

Тележка ТБ-01, ТБ-06, ТБ-07 оснащена крышкой, закрепленной на каркасе изделия посредством шарнира. Движение в шарнирном соединении крышки с корпусом изделий должно быть легким и плавным, без заеданий. Усилие, необходимое для поднятия и закрытия крышки не должно превышать 50 Н.

Тележка ТБ-01, ТБ-02, ТБ-03, ТБ-05, ТБ-07 оснащена мешком. Мешок представляет собой прямоугольную емкость с допустимой нагрузкой не более $10 \pm 0,2$ кг.

Полка и дно ящика должны выдерживать номинальную нагрузку $15 \pm 0,2$ кг, при этом прогиб не должен превышать 3 мм.

Габаритные размеры, масса, нагрузка тележки и диаметр колес должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Высота, мм, $\pm 10\%$	Ширина, мм, $\pm 10\%$	Глубина, мм, $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 5\%$	Диаметр колес, мм $\pm 10\%$	Нагрузка, кг $\pm 10\%$
ТП-01.00	900	1120	650	24000	160	400
ТП-01.01	900	1200	800	31600	160	400
ТП-01.02	900	1400	800	35000	160	400
ТП-01.03	900	1200	700	27700	160	400

Артикул	Высота, мм, ± 10% %	Ширина, мм, ± 10%	Глубина, мм, ± 10	Масса, г ± 5 %	Диаметр колес, мм± 10%	Нагрузка, кг± 10%
ТП-02.00	950	1050	650	23900	160	400
ТП-02.01	950	1250	650	28186	160	400
ТП-02.02	950	1350	650	30329	160	400
ТП-02.03	950	1500	800	40960	160	400
ТП-02.04	950	1700	800	46235	160	400
ТП-03.00	950	1050	650	28900	160	400
ТП-03.01	950	1250	650	34185	160	400
ТП-03.02	950	1350	650	37328	160	400
ТП-03.03	950	1500	800	48960	160	400
ТП-03.04	950	1700	800	55235	160	400
ТП-04.00	980	1100	650	28700	160	400
ТП-04.01	950	1250	650	33985	160	400
ТП-04.02	950	1350	650	37128	160	400
ТП-04.03	950	1500	800	48760	160	400
ТП-04.04	950	1700	800	55035	160	400
ТП-05.00	950	1050	650	25700	160	400
ТП-05.01	950	1250	650	30785	160	400
ТП-05.02	950	1350	650	33628	160	400
ТП-05.03	950	1500	800	44960	160	400
ТП-05.04	950	1700	800	51035	160	400
ТП-06.00	900	1120	650	27000	200	400
ТП-06.01	900	1200	700	34800	200	400
ТП-06.02	900	1200	800	38400	200	400
ТП-06.03	900	1400	800	31700	200	400
ТП-07.00	950	1050	650	29700	160	400
ТП-07.01	950	1250	650	34985	160	400
ТП-07.02	950	1350	650	38128	160	400
ТП-07.03	950	1500	800	49760	160	400
ТП-07.04	950	1700	800	55035	160	400
ТП-08.00	900	710	540	7950	160 и 50	50
ТП-09.00	880	390	390	8000	75	50
ТП-10.00	860	1000	500	15300	125	100
ТП-10.01	860	1130	600	18000	125	100
ТП-10.02	860	1200	600	18600	125	100
ТБ-01.00	918	850	500	12470	125	50
ТБ-01.01	918	900	500	12800	125	50

Артикул	Высота, мм, ± 10% %	Ширина, мм, ± 10%	Глубина, мм, ± 10	Масса, г ±5 %	Диаметр колес, мм± 10%	Нагрузка, кг± 10%
ТБ-02.00	735	898	500	9800	75	25
ТБ-03.00	860	1040	500	12100	75	25
ТБ-04.00	1600	1000	450	22500	125	100
§						
ТБ-04.01	1700	1100	450	24000	125	100
ТБ-05.00	850	1000	550	19000	125	25
ТБ-06.00	900	600	500	7200	160	50
ТБ-06.01	900	550	460	7120	160	50
ТБ-06.02	1000	500	450	7120	160	50
ТБ-06.03	1025	625	460	7120	160	50
ТБ-07.00	940	940	500	13700	125	25
ТД-01.00	900	800	400	13600	75	50
ТД-01.01	900	900	500	16900	75	50
ТД-01.02	900	1000	500	18100	100	50
ТД-01.03	900	1100	600	23100	125	50
ТД-01.04	900	1200	600	24000	125	50
ТД-02.00	900	650	450	8900	50	20
ТД-02.01	900	750	450	10500	75	20
ТД-02.02	900	800	500	12445	75	20
ТД-02.03	900	800	600	14930	100	20
ТД-02.04	900	900	400	11200	100	20
ТД-02.05	900	900	500	14000	100	20
ТД-02.06	900	900	600	16800	125	20
ТД-02.07	900	950	600	17700	125	20
ТД-02.08	900	1000	500	15555	125	20
ТД-02.09	900	1000	600	18650	125	20
ТД-02.10	900	1000	700	21780	125	20
ТД-02.11	900	1100	600	20530	125	20
ТД-02.12	900	1100	700	23950	125	20
ТД-03.00	900	650	450	11500	50	25
ТД-03.01	900	750	450	13300	75	25
ТД-03.02	900	800	500	15800	75	25
ТД-03.03	900	800	600	18800	100	25
ТД-03.04	900	900	400	14200	100	25
ТД-03.05	900	900	500	17700	100	25
ТД-03.06	900	900	600	21300	125	25

Артикул	Высота, мм, ± 10% %	Ширина, мм, ± 10%	Глубина, мм, ± 10	Масса, г ±5 %	Диаметр колес, мм± 10%	Нагрузка, кг± 10%
ТД-03.07	900	950	600	22520	125	25
ТД-03.08	900	1000	500	19700	125	25
ТД-03.09	900	1000	600	23600	125	25
ТД-03.10	900	1000	700	27560	125	25
ТД-03.11	900	1100	600	26100	125	25
ТД-03.12	900	1100	700	30300	125	25
ТД-04.00	930	600	425	15500	50	25
ТД-04.01	960	620	450	16800	50	25
ТД-04.02	900	600	510	18600	50	25
ТД-04.03	900	645	425	16500	50	25
ТД-04.04	900	700	500	21300	50	25
ТД-04.05	930	750	480	21800	50	25
ТД-05.00	870	600	500	23000	50	26
ТД-05.01	870	800	500	25300	50	26
ТД-05.02	870	800	600	26800	50	26

Габаритные размеры и масса составных частей изделия соответствуют значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Артикул тележки	Высота, мм, ± 10%	Ширина, мм, ± 10%	Глубина, мм, ± 10%	Масса, г ±10 %
Мешок съемный из ПВХ	ТБ-02.00	680	450	350	350
	ТБ-03.00	680	450	280	300
Мешок съемный из ткани	ТБ-01.00	620	450	280	290
	ТБ-01.01	620	450	280	290
	ТБ-07.00	700	450	300	180
	ТБ-05.00	550	560	500	330
Полка съемная	ТП-10.00	20	1000	500	400
	ТП-10.01	20	1130	600	525
	ТП-10.02	20	1200	600	555
	ТД-04.00	20	560	415	1821
	ТД-04.01	20	560	500	1900
	ТД-04.02	20	560	500	1900
	ТД-04.03	20	605	415	1967
	ТД-04.04	20	660	790	4085
	ТД-04.05	20	710	470	2615

Наименование	Артикул тележки	Высота, мм, $\pm 10\%$	Ширина, мм, $\pm 10\%$	Глубина, мм, $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 10\%$
	ТД-05.00	20	560	495	1900
	ТД-05.01	20	760	490	2918
	ТД-05.02	20	760	560	3335
Поддон съёмный	ТБ-07.00 Верхний	80	170	450	800
	ТБ-07.00 Нижний	50	410	450	1900
Крышка съёмная	ТБ-07.00	20	320	460	1250
Ограждение съёмное	ТП-03.00	500	749	23	2997
	ТП-03.01	500	949	23	3632
	ТП-03.02	500	1049	23	3950
	ТП-03.03	500	1199	23	4427
	ТП-03.04	500	1399	23	5062
	ТП-04.00	600	800	23	2850
	ТП-04.01	500	949	23	3572
	ТП-04.02	500	1049	23	3880
	ТП-04.03	500	1199	23	4357
	ТП-04.04	500	1399	23	4982
	ТП-05.00	500	749	22	2887
	ТП-05.01	500	949	22	3493
	ТП-05.02	500	1049	22	3797
	ТП-05.03	500	1199	22	4251
	ТП-05.04	500	1399	22	4858
	ТП-07.00	500	749	22	3104
	ТП-07.01	500	949	22	3706
	ТП-07.02	500	1049	22	4007
	ТП-07.03	500	1199	22	4408
Ручка	ТП-01.00	700	650	160	2560
	ТП-01.01	700	800	160	2748
	ТП-01.02	700	800	160	2748
	ТП-01.03	700	700	160	2623
	ТП-02.00	750	650	160	2685
	ТП-02.01	750	650	160	2685
	ТП-02.02	750	650	160	2685

Наименование	Артикул тележки	Высота, мм, ± 10%	Ширина, мм, ± 10%	Глубина, мм, ± 10%	Масса, г ±10 %
	ТП-02.03	750	800	160	2872
	ТП-02.04	750	800	160	2872
	ТП-03.00	750	650	160	2685
	ТП-03.01	750	650	160	2685
	ТП-03.02	750	650	160	2685
	ТП-03.03	750	800	160	2872
	ТП-03.04	750	800	160	2872
	ТП-04.00	780	650	160	2760
	ТП-04.01	750	650	160	2685
	ТП-04.02	750	650	160	2685
	ТП-04.03	750	800	160	2872
	ТП-04.04	750	800	160	2872
	ТП-05.00	750	650	160	2685
	ТП-05.01	750	650	160	2685
	ТП-05.02	750	650	160	2685
	ТП-05.03	750	800	160	2872
	ТП-05.04	750	800	160	2872
	ТП-06.00	680	650	160	2510
	ТП-06.01	680	700	160	2573
	ТП-06.02	680	800	160	2698
	ТП-06.03	680	800	160	2698
	ТП-07.00	750	650	160	2685
	ТП-07.01	750	650	160	2685
	ТП-07.02	750	650	160	2685
	ТП-07.03	750	800	160	2872
	ТП-07.04	750	800	160	2872
	ТБ-01.00	23	500	410	820
	ТБ-01.01	23	500	460	880
	ТД-04.00	870	425	25	1968
	ТД-04.01	900	450	25	2081
	ТД-04.02	840	510	25	2235
	ТД-04.03	840	425	25	1900
	ТД-04.04	840	500	25	2235
	ТД-04.05	870	480	25	2220
	ТД-05.00	810	500	25	1570
	ТД-05.01	810	500	25	1570
	ТД-05.02	810	600	25	1884

Наименование	Артикул тележки	Высота, мм, $\pm 10\%$	Ширина, мм, $\pm 10\%$	Глубина, мм, $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 10\%$
Платформа	ТП-01.00	90	990	650	10732
	ТП-01.01	90	1070	800	14276
	ТП-01.02	90	1270	800	16944
	ТП-01.03	90	1070	700	12492
	ТП-02.00	90	790	650	8564
	ТП-02.01	90	990	650	10732
	ТП-02.02	90	1090	650	11816
	ТП-02.03	90	1240	800	16544
	ТП-02.04	90	1440	800	19213
	ТП-03.00	90	790	650	8564
	ТП-03.01	90	990	650	10732
	ТП-03.02	90	1090	650	11816
	ТП-03.03	90	1240	800	16544
	ТП-03.04	90	1440	800	19213
	ТП-04.00	90	840	650	9106
	ТП-04.01	90	990	650	10732
	ТП-04.02	90	1090	650	11816
	ТП-04.03	90	1240	800	16544
	ТП-04.04	90	1440	800	19213
	ТП-05.00	90	790	650	8564
	ТП-05.01	90	990	650	10732
	ТП-05.02	90	1090	650	11816
	ТП-05.03	90	1240	800	16544
	ТП-05.04	90	1440	800	19213
	ТП-06.00	90	520	650	5637
	ТП-06.01	90	570	700	6654
	ТП-06.02	90	670	800	8939
	ТП-06.03	90	670	800	8939
	ТП-07.00	90	790	650	8564
	ТП-07.01	90	990	650	10732
	ТП-07.02	90	1090	650	11816
	ТП-07.03	90	1240	800	16544
	ТП-07.04	90	1440	800	19213
Каркас	ТП-10.00	710	1000	500	12100
	ТП-10.01	710	1130	600	14520
	ТП-10.02	710	1200	600	15419
	ТБ-02.00	650	898	500	9800

Наименование	Артикул тележки	Высота, мм, $\pm 10\%$	Ширина, мм, $\pm 10\%$	Глубина, мм, $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 10\%$
	ТБ-03.00	760	1040	500	10100
	ТБ-04.00	1450	1000	450	23000
	ТБ-04.01	1550	1100	450	26800
	ТБ-05.00	440	1000	550	13520
	ТД-01.00	800	800	400	9200
	ТД-01.01	800	900	500	12938
	ТД-01.02	775	1000	500	14375
	ТД-01.03	750	1100	600	18975
	ТД-01.04	750	1200	600	20700
	ТД-02.00	820	650	450	7644
	ТД-02.01	795	750	450	8820
	ТД-02.02	795	800	500	10453
	ТД-02.03	770	800	600	12544
	ТД-02.04	770	900	400	9408
	ТД-02.05	770	900	500	11760
	ТД-02.06	745	900	600	14112
	ТД-02.07	745	950	600	14896
	ТД-02.08	745	1000	500	13067
	ТД-02.09	745	1000	600	15680
	ТД-02.10	745	1000	700	18293
	ТД-02.11	745	1100	600	17248
	ТД-02.12	745	1100	700	20123
	ТД-03.00	820	650	450	9756
	ТД-03.01	795	750	450	11257
	ТД-03.02	795	800	500	13342
	ТД-03.03	770	800	600	16011
	ТД-03.04	770	900	400	12008
	ТД-03.05	770	900	500	15010
	ТД-03.06	745	900	600	18012
	ТД-03.07	745	950	600	19013
	ТД-03.08	745	1000	500	16678
	ТД-03.09	745	1000	600	20013
	ТД-03.10	745	1000	700	23349
	ТД-03.11	745	1100	600	22015
	ТД-03.12	745	1100	700	25684
Борт откидной	ТП-10.00	170	1000	20	2700
	ТП-10.01	170	1130	20	3051

Наименование	Артикул тележки	Высота, мм, $\pm 10\%$	Ширина, мм, $\pm 10\%$	Глубина, мм, $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 10\%$
	ТП-10.02	170	1200	20	3240
Ограждение	ТП-06.00	222	990	650	2130
	ТП-06.01	222	1070	700	2479
	ТП-06.02	222	1070	800	2833
	ТП-06.03	222	1270	800	3363
Основание	ТБ-01.00	70	850	500	2850
	ТБ-01.01	70	900	500	3018
	ТБ-07.00	200	800	500	2530
Перегородка	ТБ-01.00	833	500	25	2120
	ТБ-01.01	833	500	25	2120
	ТБ-07.00	720	60	28	890
Крышка	ТБ-01.00	25	330	500	890
	ТБ-01.01	25	355	500	957
Дуга верхняя	ТБ-07.00	22	940	460	1870
Корпус с ящиками	ТД-04.00	185	565	425	6320
	ТД-04.01	185	585	450	7003
	ТД-04.02	185	565	510	7200
	ТД-04.03	185	610	425	6480
	ТД-04.04	185	665	500	4520
	ТД-04.05	185	715	480	4630
	ТД-05.00	340	565	500	14820
	ТД-05.01	340	765	500	14820
	ТД-05.02	340	765	600	17784
Рамка	ТД-05.00	40	580	500	1220
	ТД-05.01	40	780	500	1641
	ТД-05.02	40	780	600	1969

11. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Конструкция тележки должна обеспечивать плавный ход. Усилие, необходимое для ее перемещения с равномерно распределенной номинальной нагрузкой 22,5 кг $\pm 0,2$ кг по твердой плоской поверхности, не должно превышать 100Н для тележек массой до 50 кг и 120Н для тележек массой до 80 кг.

Колеса тележки должны быть съемными, на подшипниках качения или скольжения. На поверхности шин колес не должно быть пузырей, свищей, надрывов. Шины колес должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Колеса должны свободно, без заедания вращаться на горизонтальной оси от усилия не более 0,35 Н.

Торцевое биение обода колеса изделий не должно быть более 3 мм, радиальное – не более 2 мм.

Усилие, необходимое для фиксации и расфиксации зажимов тормозов для колес диаметром 125 мм, 100 мм, 75 мм, 50 мм не более 150 Н (15 кгс). Для колес диаметром 160 мм усилие, необходимо для фиксации и расфиксации не более 250 Н (25кгс).

Сочленяемые механические детали тележки должны быть плотно соединены друг с другом без зазоров. Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надёжно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания в них не допускаются. Ходовая часть тележки должна обеспечивать свободное перемещение вперёд, назад, поворот в любую сторону как загруженной, так и незагруженной тележки.

Тележка в загруженном состоянии с номинальной нагрузкой $15 \pm 0,2$ кг на поверхность должна стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между одним из колес и полом не должен превышать 3 мм.

Усилие, необходимое для фиксации съемных элементов тележки (ограждения, полки, ящики) в рабочем положении, должно быть не более 80 Н (8 кгс).

Лакокрасочное покрытие в виде порошковой краски должно быть IV класса по ГОСТ 9.032 и допускать влажную уборку поверхностей с применением моющих средств.

Металлические и неметаллические (неорганические) антикоррозионные покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.306.

Шероховатость механически обработанных наружных поверхностей RA должна составлять не более 100 мкм по ГОСТ 2789.

Поверхности тележки должны быть устойчивы к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644, либо 1%-ным раствором технического монохлорамина (хлорамин ХБ) по ГОСТ 14193.

Тележка должна быть устойчива к воздействию механических факторов для группы 3 по ГОСТ Р 50444.

Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2;

Изделия в транспортной таре при хранении должны быть устойчивы к климатическим воздействиям 2 (С) по ГОСТ 15150.

Изделия в транспортной таре при транспортировании должны быть устойчивы к климатическим воздействиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Изделия, упакованные в транспортную тару, должны сохранять вибропрочность и ударопрочность по ГОСТ Р 50444.

Срок службы изделия до списания - 7 лет. За критерий предельного состояния изделий принимается состояние, при котором восстановление изделий невозможно, либо нецелесообразно по технико-экономическим (стоимость годовых ремонтов превышает половину стоимости изделия) или функциональным показателям.

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1. Тележка медицинская ТП-01 (артикулы 00-03), в составе:

- Ручка – 1 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
 - болт М10х20 - 18 шт.;
 - гайка М10 - 18 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Тележка медицинская ТП-02 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;

- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт M10x20 - 20 шт.;
- гайка M10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Тележка медицинская ТП-03 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съёмное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт M10x20 - 20 шт.;
- гайка M10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Тележка медицинская ТП-04 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съёмное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт M10x20 - 20 шт.;
- гайка M10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Тележка медицинская ТП-05 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съёмное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт M10x20 - 20 шт.;
- гайка M10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Тележка медицинская ТП-06 (артикулы 00-03), в составе:

- Ограждение – 1 шт.;
- Ручка – 1 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт M10x20 - 20 шт.;
- гайка M10 - 20 шт.;
- болт M6x35 - 2 шт.;
- гайка M6 - 2 шт.;
- шайба M6 - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Тележка медицинская ТП-07 (артикулы 00-04), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Ограждение съемное – 2 шт.;
- Платформа – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Тележка медицинская ТП-08, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Тележка медицинская ТП-09, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Тележка медицинская ТП-10 (артикулы 00-02), в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Полка съемная – 2 шт.;
- Борт откидной – 2 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
- гайка М8 - 16 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Тележка медицинская ТБ-01 (артикулы 00-01), в составе:

- Основание – 1 шт.;
- Перегородка – 1 шт.;
- Ручка – 2 шт.;
- Крышка – 2 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Мешок съемный из ткани – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х35 - 8 шт.;
- гайка М6 - 8 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Тележка медицинская ТБ-02, в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Мешок съемный из ПВХ – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
- гайка М8 - 16 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Тележка медицинская ТБ-03, в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Мешок съемный из ПВХ – 2 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
- гайка М8 - 16 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Тележка медицинская ТБ-04 (артикулы 00-01), в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Тележка медицинская ТБ-05, в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Мешок съемный из ткани – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Тележка медицинская ТБ-06 (артикулы 00-03), в составе:

- Тележка в собранном виде - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Тележка медицинская ТБ-07, в составе:

- Основание – 1 шт.;
- Перегородка – 2 шт.;
- Дуга верхняя – 1 шт.;
- Крышка съемная – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Мешок съемный из ткани – 1 шт.;
- Поддон съемный нижний – 1 шт.;
- Поддон съемный верхний – 1 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х35 - 8 шт.;
- гайка М6 - 8 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Тележка медицинская ТД-01 (артикулы 00-04), в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Тележка медицинская ТД-02 (артикулы 00-12), в составе:

- Каркас – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

20. Тележка медицинская ТД-03 (артикулы 00-12), в составе:

- Каркас – 1 шт.;

- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

21. Тележка медицинская ТД-04 (артикулы 00-05), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Корпус с ящиком – 1 шт.;
- Полка съемная – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х30 – 12 шт.;
- гайка М6 - 12 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

22. Тележка медицинская ТД-05 (артикулы 00-02), в составе:

- Ручка – 2 шт.;
- Полка съемная – 2 шт.;
- Корпус с ящиками – 1 шт.;
- Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Колесо – 2 шт.;
- Рамка – 1 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х30 – 12 шт.;
- гайка М6 - 12 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. УПАКОВКА

Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и технических условий изделия.

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении.

Тележка может поставляться в собранном или разобранном виде. Изделие, либо его составные части упаковывают в трехслойный картон по ГОСТ Р 52901 (первичная упаковка).

Тележка в сборе укладывается в деревянные обрешётки по ГОСТ 12082, разобранные – в ящики по ГОСТ 9142, ГОСТ 16511 и ГОСТ 18617 (транспортная упаковка).

Эксплуатационная документация должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, который помещают в транспортную упаковку.

Максимальные габаритные размеры изделия в упаковке не должны превышать 170х110х45 см. (ВхШхГ)

В каждую упаковку должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименования варианта исполнения тележки;
- обозначения настоящих технических условий;
- дата упаковывания,
- штамп ОТК или клеймо упаковщика.

14. МАРКИРОВКА

Маркировка тележки наносится на табличку по ГОСТ 12971, прикрепляемую на видном месте.

Индивидуальная маркировка тележки должна быть четкой и содержать информацию:

- наименование, юридический адрес производителя;

- наименование медицинского изделия;
- модель;
- номер партии;
- дата изготовления (месяц, год);
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- срок службы;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»;
- символ «Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза».

Примечания:

1. Допускается заменять надписи на маркировке изделия на символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.
2. При недостатке места на изделии маркировку наносят на бумажный ярлык, приклеиваемый к первичной упаковке.

Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка, на которой указано:

- наименование, юридический адрес производителя;
- наименование медицинского изделия;
- модель;
- номер регистрационного удостоверения и дата выдачи;
- масса брутто;
- срок службы;
- манипуляционные знаки, имеющие значение «Верх», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.
- наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения.

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150

Условия хранения - по группе условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Хранение тележек следует осуществлять в закрытых помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +40 °С до -50 °С, относительной влажности до 98% ±3% при 25°С, исключающих воздействие паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.

Упакованные изделия должны транспортироваться и храниться в положении, указанном предупредительными знаками.

16. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684.

Утилизацию изделий проводить как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО).

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы – 7 лет.

В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющий гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.

18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

18.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке мебели медицинской.

Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования мебели медицинской, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

Критерием предельного состояния является состояние изделий, при которых дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

18.2. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации подлежат:

- изделия с дефектами, выявленными при эксплуатации, хранении и транспортировании в течение установленного гарантийного срока;
- изделия, у которых выявлено несоответствие тары, упаковки, маркировки, и комплектности требованиям сопроводительной документации.
- информацию(сообщение) о нежелательных событиях(явлениях), которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) при применении изделия.

Рекламации не подлежат:

- истечение срока гарантийных обязательств на изделие;
- случаи, если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения потребителем условий и правил эксплуатации (применения), хранения и транспортирования.

В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт(замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;
- дефектную ведомость;
- гарантийный талон.

Срок подготовки ответа от предприятия – изготовителя или от предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание владельцу составляет 30 календарных дней.

18.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) отыскание и исправление неисправностей или замена частей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

19. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Распаковать изделие.
2. Собрать тележку согласно инструкции (Приложение А) прикрутив составные части. Тележка ТП-08, ТП-09, ТБ-06 поставляются в собранном виде.
3. Вымыть руки и надеть специальную защитную одежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, халат и т.п.).
4. Использовать тележку согласно предусмотренного назначения.

5. Для активации тормозов (кроме тележек ТП-08, ТП-09, ТБ-06) необходимо нажать ногой на панель до ее соприкосновения с шиной колеса. Для того, чтобы убрать тормоз, необходимо панель привести в исходное состояние.
6. Перед перемещением тележки обязательно убрать тормоза.
7. Запрещается эксплуатация тележек с неисправными тормозами.
8. Наружные поверхности изделия продезинфицировать после каждого использования.
9. Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

Тележка должна быть пригодна к эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 40 °С, при воздействии влажности до 80% при температуре плюс 25 °С.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ИЗДЕЛИЯ

К использованию изделий допускается только персонал, ознакомленный с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В процессе эксплуатации изделий, персонал должен обеспечиваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно требованиям нормативных документов.

21. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, РАЗРАБОТЧИК

ИП Гриневич Л.А.

Адрес производства: Россия, 679005, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, д.17а,

Адрес электронной почты: mebeleao@yandex.ru

22. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование документа
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.306-85	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 15150 – 69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 9569-2006	Бумага парафинированная. Технические условия
ГОСТ 12971-67	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
ГОСТ 12082-1982	Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 16511-86	Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия
ГОСТ 18617-83	Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.0.003-2015	Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация
ГОСТ 30.001-83	Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения
ГОСТ 12.3.009-76	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.025-80	Система стандартов безопасности труда. Обработка металлов резанием. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.005-75	Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 27575-87	Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 27574-87	Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 12.2.061-81	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам
ГОСТ 12.2.062-81	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Ограждения защитные
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ Р 12.3.047-2012	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля
ГОСТ 12.1.003-2014	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 58577-2019	Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов
ГОСТ Р 59061-2020	Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения
ГОСТ 30167-2014	Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ Р 12.1.019-2017	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.016-79	Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.019-2017	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ Р 59053-2020	Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 12.4.009-83	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
ГОСТ 15140-78	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
ГОСТ 9.302-88	Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 9.303-8	Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования к выбору.
СП 60.13330.2016	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СП 2.2.3670-20	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
СП 1.1.1058-01	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

23. СИМВОЛЫ

Символ	Описание
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Беречь от влаги
	Верх
EAC	Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза

24. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТК предприятия-изготовителя

Вариант исполнения изделия _____ изготовлен в соответствии с ТУ 30.99.10-001-0172742609-2023 и признан годным к эксплуатации

Номер партии

Дата изготовления

Дата ввода в эксплуатацию.....

Регистрационное удостоверение №..... от

Сертификат соответствия

25. Гарантийный талон на ремонт

Вариант исполнения изделия _____

Номер партии

Дата изготовления

Дата ввода в эксплуатацию.....

Регистрационное удостоверение №.....от


Выполнены работы по устранению неисправностей

.....
.....

(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное)

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-01

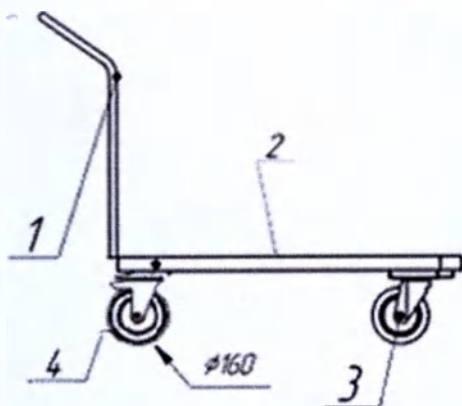

Сборочные единицы:

- 1 Ручка – 1 шт.;
- 2 Платформа – 1 шт.;
- 3 Колесо – 2 шт.;
- 4 Колесо с тормозом – 2 шт.;


Комплект крепежа:

- болт М10х20 - 18 шт.;
- гайка М10 - 18 шт.

1. Уложить платформу (2) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу со стороны ручки при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (3) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на основание и в стаканы для установки ручки установить ручку (1).
5. Прикрепить ручку к платформе болтами М10х20 в количестве 2 шт., и гайками М10 в количестве 2 шт.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-02


Сборочные единицы:

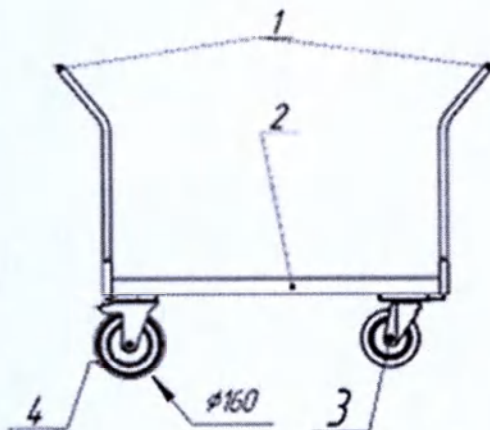

- 1. Ручка – 2 шт.;
 - 2. Платформа – 1 шт.;
 - 3. Колесо – 2 шт.;
 - 4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
 - гайка М10 - 20 шт.

1. Уложить платформу (2) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу с левой стороны при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (3) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на основание и в стаканы для установки ручки установить ручки (1).
5. Прикрепить ручки к платформе болтами М10х20 в количестве 4 шт., и гайками М10 в количестве 4 шт.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-03

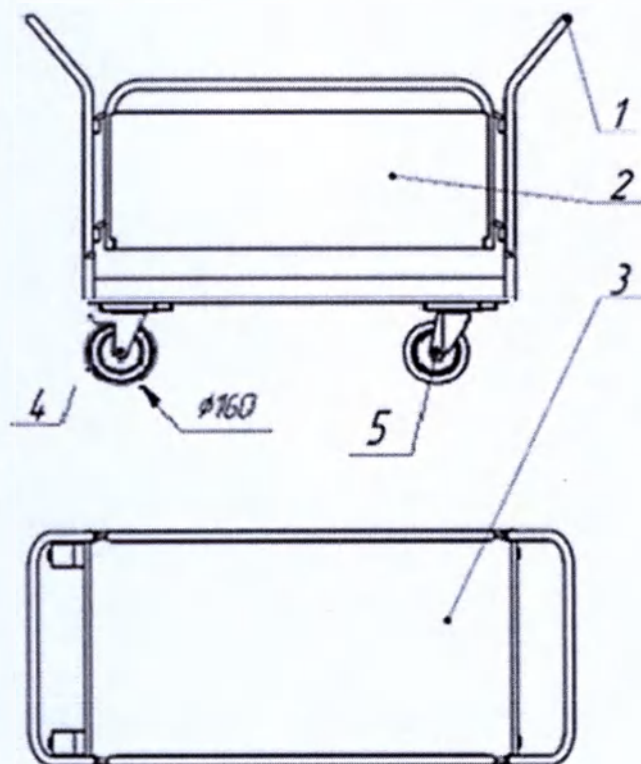


Сборочные единицы:

1. Ручка – 2 шт.;
 2. Ограждение съемное – 2 шт.;
 3. Платформа – 1 шт.;
 4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
 5. Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
 - гайка М10 - 20 шт.

1. Уложить платформу (3) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу с левой стороны при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (5) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на основание и в стаканы для установки ручки установить ручки (1).
5. Прикрепить ручки к платформе болтами М10х20 в количестве 4 шт., и гайками М10 в количестве 4 шт.
6. В специальные проушины на ручках тележки установить съёмные ограждения (2).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-04

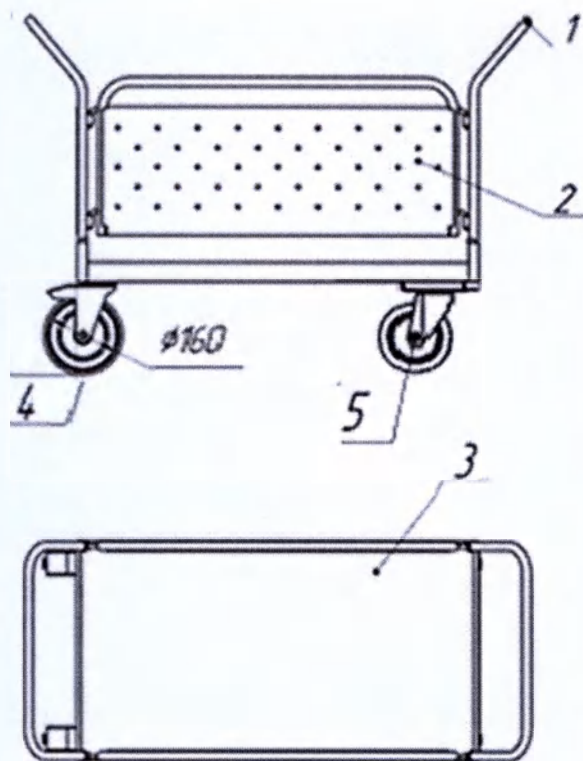

Сборочные единицы:


1. Ручка – 2 шт.;
2. Ограждение съёмное – 2 шт.;
3. Платформа – 1 шт.;
4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
5. Колесо – 2 шт.;

Комплект крепежа, в составе:

- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.

1. Уложить платформу (3) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу с левой стороны при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (5) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на поверхность и в стаканы для установки ручки установить ручки (1).
5. Прикрепить ручки к платформе М10х20 в количестве 4 шт., и гайками М10 в количестве 4 шт.
6. В специальные проушины на ручках тележки установить съёмные ограждения (2).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-05

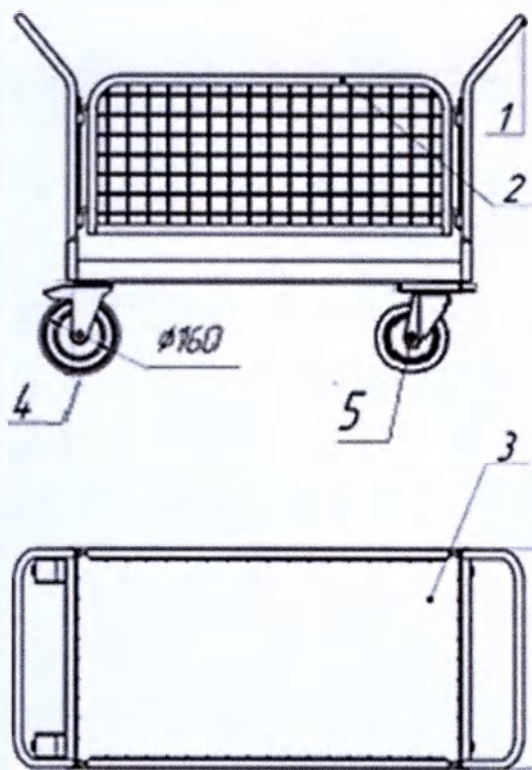

Сборочные единицы:


1. Ручка – 2 шт.;
2. Ограждение съёмное – 2 шт.;
3. Платформа – 1 шт.;
4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
5. Колесо – 2 шт.;

Комплект крепежа, в составе:

- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.

1. Уложить платформу (3) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу с левой стороны при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (5) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на поверхность и в стаканы для установки ручки установить ручки (1).
5. Прикрепить ручки к платформе М10х20 в количестве 4 шт., и гайками М10 в количестве 4 шт.
6. В специальные проушины на ручках тележки установить съёмные ограждения (2).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-06

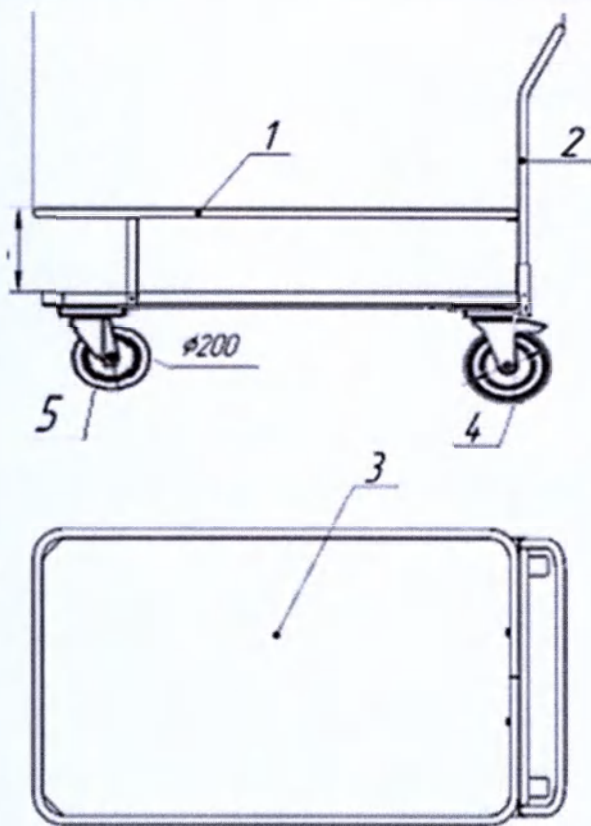

Сборочные единицы:


1. Ограждение – 1 шт.;
2. Ручка – 1 шт.;
3. Платформа – 1 шт.;
4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
5. Колесо – 2 шт.;

Комплект крепежа, в составе:

- болт М10х20 - 20 шт.;
- гайка М10 - 20 шт.;
- болт М6х35 - 2 шт.;
- гайка М6 - 2 шт.;
- шайба М6 - 2 шт.

1. Уложить платформу (3) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу со стороны ручки при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (5) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на основание и в стаканы для установки ручки установить ручку (2).
5. Прикрепить ручку к платформе болтами М10х20 в количестве 4 шт., и гайками М10 в количестве 4 шт.
6. Через специальные отверстия на платформе закрепить ограждения (1) при помощи болтов М6х35 в количестве 2 шт, гаек М6 в количестве 2 шт и шайбы М6 в количестве 2 шт.
7. Опустить ограждения до фиксирующих планок на ручке тележки.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-07

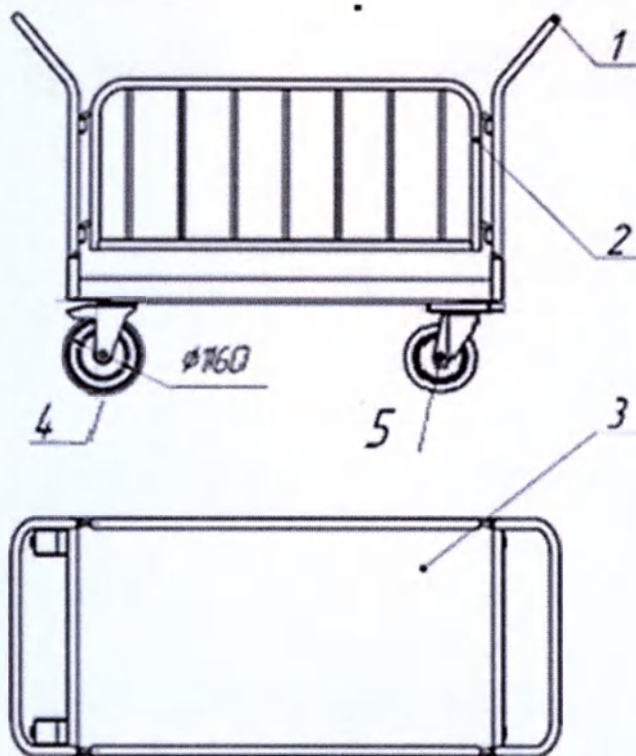


Сборочные единицы:

1. Ручка – 2 шт.;
 2. Ограждение съёмное – 2 шт.;
 3. Платформа – 1 шт.;
 4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
 5. Колесо – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М10х20 - 20 шт.;
 - гайка М10 - 20 шт.


1. Уложить платформу (3) верхней поверхностью на ровное основание.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) на платформу с левой стороны при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (5) на платформу при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть платформу колесами на основание и в стаканы для установки ручки установить ручки (1).
5. Прикрепить ручки к платформе болтами М10х20 в количестве 4 шт., и гайками М10 в количестве 4 шт.
6. В специальные проушины на ручках тележки установить съёмные ограждения (2).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-08


Тележка поставляется в собранном виде

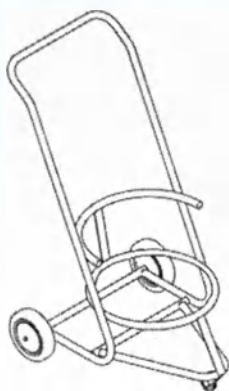

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-09

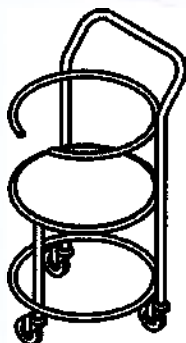

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТП-10

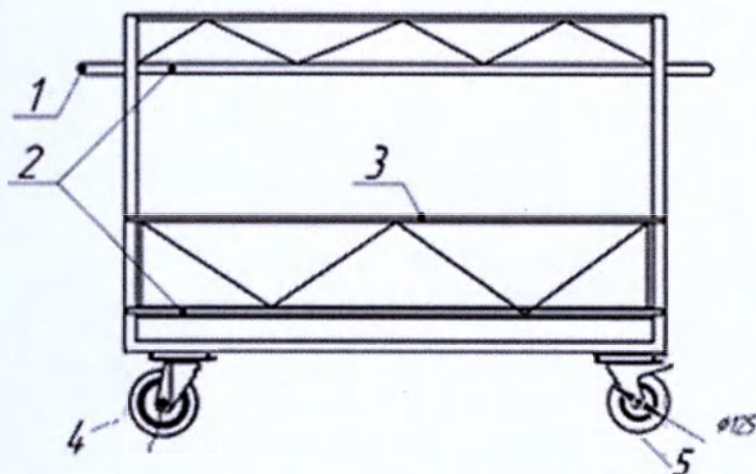


Сборочные единицы:

- 1. Каркас – 1 шт.;
- 2. Полка съемная – 2 шт.;
- 3. Борт откидной – 2 шт.;
- 4. Колесо – 2 шт.;
- 5. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
 - болт М8х20 - 16 шт.;
 - гайка М8 - 16 шт.

1. Перевернуть тележку нижним основанием корпуса тележки вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установить 2 колеса с тормозом (5) на каркас с правой стороны при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
3. Установить остальные 2 колеса (4) на каркас при помощи 8 шт. болтов М10х20 и 8 шт. гаек М10.
4. Перевернуть тележку установив ее колесами горизонтальную поверхность и установить полки (2).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-01

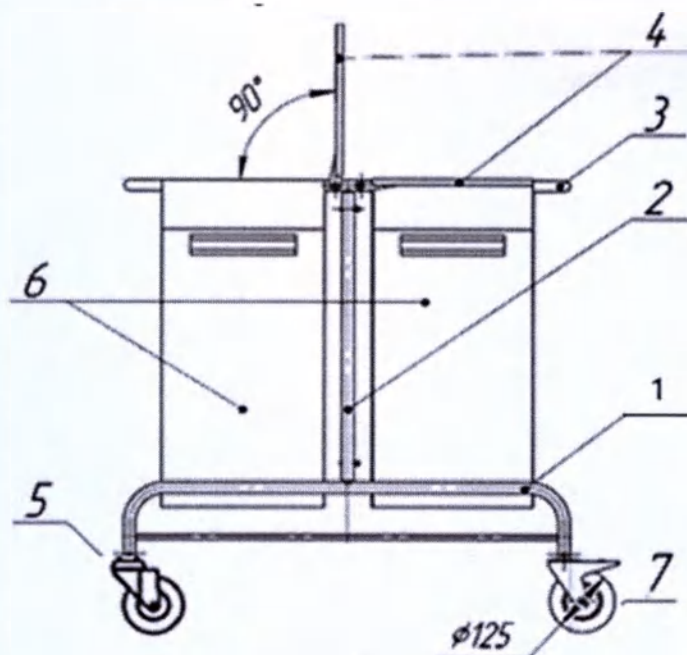


Сборочные единицы:

1. Основание – 1 шт.;
 2. Перегородка – 1 шт.;
 3. Ручка – 2 шт.;
 4. Крышка – 2 шт.;
 5. Колесо – 2 шт.;
 6. Мешок съемный из ткани – 2 шт.;
 7. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х35 – 8 шт.;
 - гайка М6 – 8 шт.

1. Соединить основание (1) и ручки (3) при помощи перегородки (2), болтов М6х35 в количестве 8шт. и гаек М6 в количестве 8шт.
2. Перевернуть тележку нижним основанием вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
3. Установить 2 колеса с тормозами (7) в резьбовые отверстия к основанию (1) с правой стороны.
4. Установить остальные 2 колеса (5) в резьбовые отверстия к основанию (1).
5. Перевернуть тележку на колеса.
6. При помощи текстильных застежек закрепить мешки (6) на верхней рамке.
7. Установить крышки (4).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-02

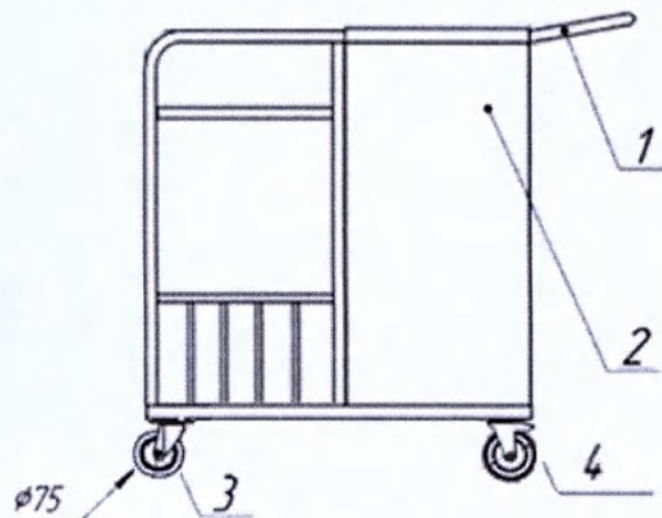


Сборочные единицы:

1. Каркас – 1 шт.;
 2. Мешок съемный из ПВХ – 1 шт.;
 3. Колесо – 2 шт.;
 4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 – 16 шт.;
 - гайка М8 – 16 шт.

1. Перевернуть тележку нижним основанием вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Прикрепить 2 колеса с тормозом (4) к нижней платформе каркаса со стороны ручки при помощи 8 шт. болтов М8х20 и 8 шт. гаек М8.
3. Прикрепить остальные 2 колеса (3) к нижней платформе каркаса при помощи 8 шт. болтов М8х20 и 8 шт. гаек М8.
4. Перевернуть тележку на колеса.
5. При помощи текстильных застежек закрепить мешок (2) верхней рамке каркаса (1).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-03

Сборочные единицы:

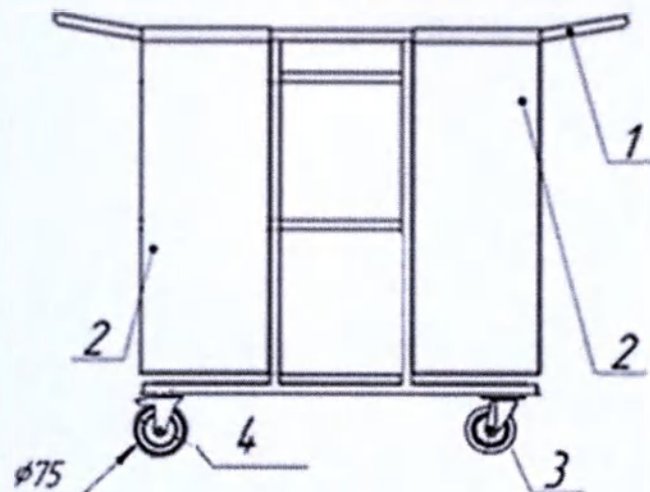


1. Каркас – 1 шт.;
 2. Мешок съемный из ПВХ – 2 шт.;
 3. Колесо – 2 шт.;
 4. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М8х20 - 16 шт.;
 - гайка М8 - 16 шт.

1. Перевернуть каркас тележки дном вверх (1), уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Прикрепить 2 колеса с тормозом (4) к нижней платформе каркаса с левой стороны при помощи 8 шт. болтов М8х20 и 8 шт. гаек М8.
3. Прикрепить остальные 2 колеса (3) к нижней платформе каркаса при помощи 8 шт. болтов М8х20 и 8 шт. гаек М8.
4. Перевернуть тележку на колеса.
5. Установить мешки (2) на ручки каркаса (1) при помощи петель.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-04


Сборочные единицы:

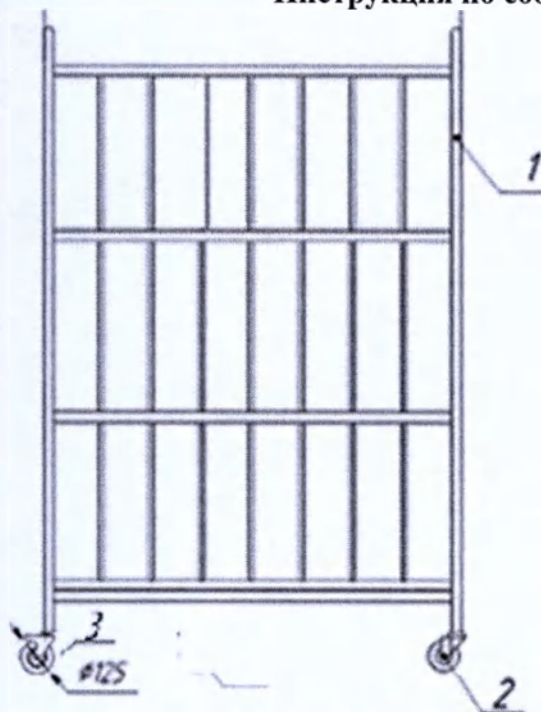

1. Каркас – 1 шт.;
2. Колесо – 2 шт.;
3. Колесо с тормозом – 2 шт.

1. Уложить тележку задним ограждением на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установить 2 колеса с тормозом (3) в резьбовые отверстия в нижней платформе каркаса с левой стороны.
3. Установить остальные 2 колеса (2) в резьбовые отверстия в нижней платформе каркаса.
4. Перевернуть тележку на колеса.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-05

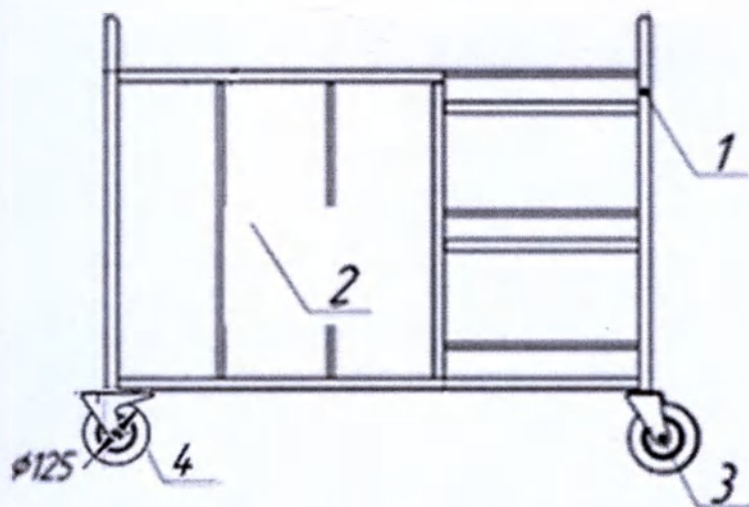

Сборочные единицы:

1. Каркас – 1 шт.;
2. Колесо – 2 шт.;
3. Мешок съемный из ткани – 1 шт.
4. Колесо с тормозом – 2 шт.

1. Перевернуть каркас тележки (1) нижней платформой вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установить 2 колеса с тормозом (4) в резьбовые отверстия в нижней платформе каркаса с левой стороны.
3. Установить остальные 2 колеса (2) в резьбовые отверстия в нижней платформе каркаса.
4. Перевернуть тележку на колеса.
5. При помощи текстильных застежек закрепить мешок (3).

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-06




Тележка поставляется в собранном виде

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТБ-07

Сборочные единицы:


1. Основание – 1 шт.;
 2. Перегородка – 2 шт.;
 3. Дуга верхняя – 1 шт.;
 4. Крышка съемная – 1 шт.;
 5. Колесо – 2 шт.;
 6. Мешок съемный из ткани – 1 шт.;
 7. Поддон съемный нижний – 1 шт.;
 8. Поддон съемный верхний – 1 шт.;
 9. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х35 - 8 шт.;
 - гайка М6 - 8 шт.

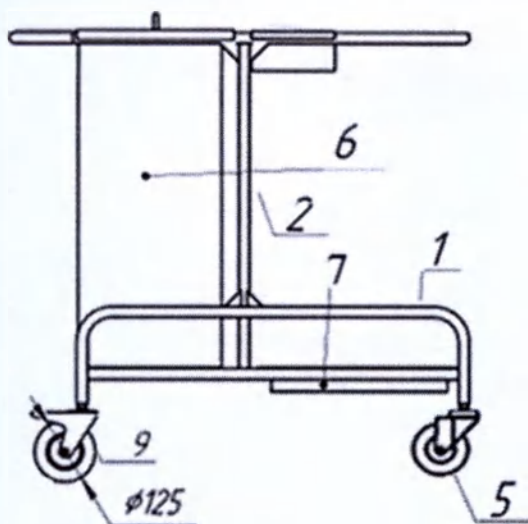

1. Соединить основание (1) и дугу верхнюю (3) при помощи перегородок (2), 8-ми шт. болтов М6х35 и гаек М6.
2. Перевернуть тележку нижним основанием вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
3. Установить 2 колеса с тормозом (9) в резьбовые отверстия в дугах основания (1) со стороны, где будет прикреплен тканый мешок.
4. Установить остальные 2 колеса (5) в резьбовые отверстия в дугах основания (1).
5. Перевернуть тележку на колеса.
6. При помощи текстильных застежек закрепить мешок (6) на дуге верхней.
7. Установить крышку (4).
8. Установить Поддон нижний (7).
9. Установить Поддон верхний (8)

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТД-01


Сборочные единицы:

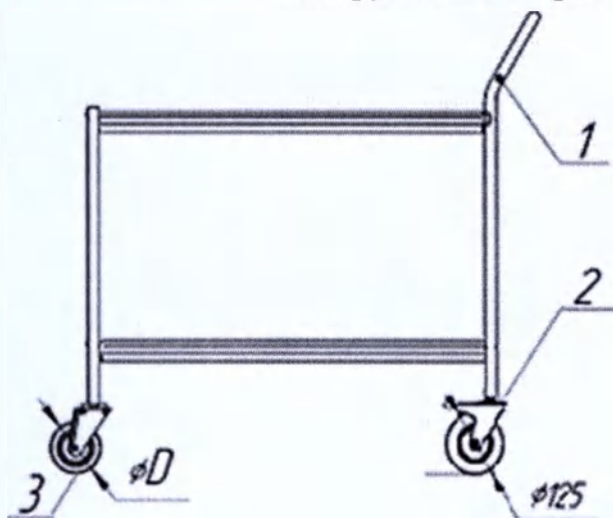

1. Каркас – 1 шт.;
2. Колесо с тормозом – 2 шт.;
3. Колесо – 2 шт.

1. Перевернуть каркас тележки (1) нижней полкой вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установить 2 колеса с тормозом (2) в резьбовые отверстия со стороны ручки.
3. Установить остальные 2 колеса (3) в резьбовые отверстия на каркас тележки.
4. Перевернуть тележку на колеса.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТД-02

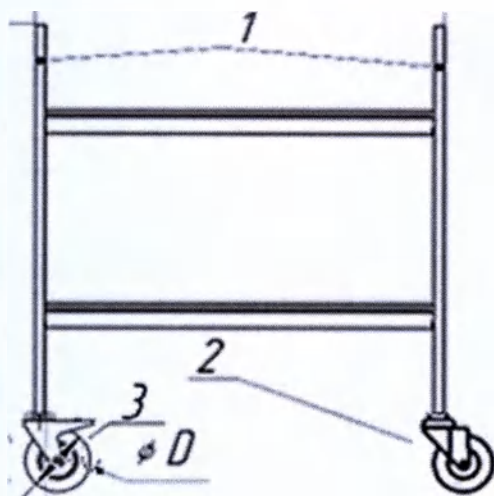


Сборочные единицы:

1. Каркас – 1 шт.;
2. Колесо – 2 шт.
3. Колесо с тормозом – 2 шт.;

1. Перевернуть каркас тележки (1) нижней полкой вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установить 2 колеса с тормозом (3) в резьбовые отверстия каркаса с левой стороны.
3. Установить остальные 2 колеса (2) в резьбовые отверстия на каркас тележки.
4. Перевернуть тележку на колеса.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТД-03


Сборочные единицы:

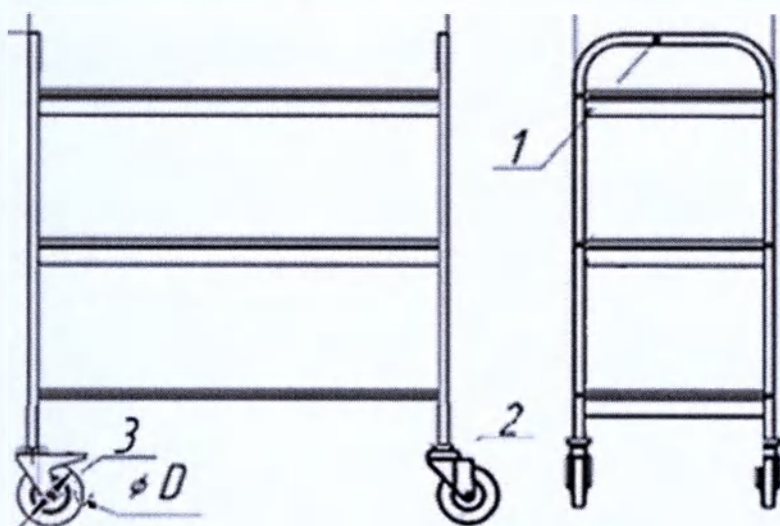

1. Каркас – 1 шт.;
2. Колесо – 2 шт.;
3. Колесо с тормозом – 2 шт.

1. Перевернуть каркас тележки (1) нижней полкой вверх, уложить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Установить 2 колеса с тормозом (3) в резьбовые отверстия в нижней платформе каркаса с левой стороны.
3. Установить остальные 2 колеса (2) в резьбовые отверстия в нижней платформе каркаса.
4. Перевернуть тележку на колеса.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТД-04

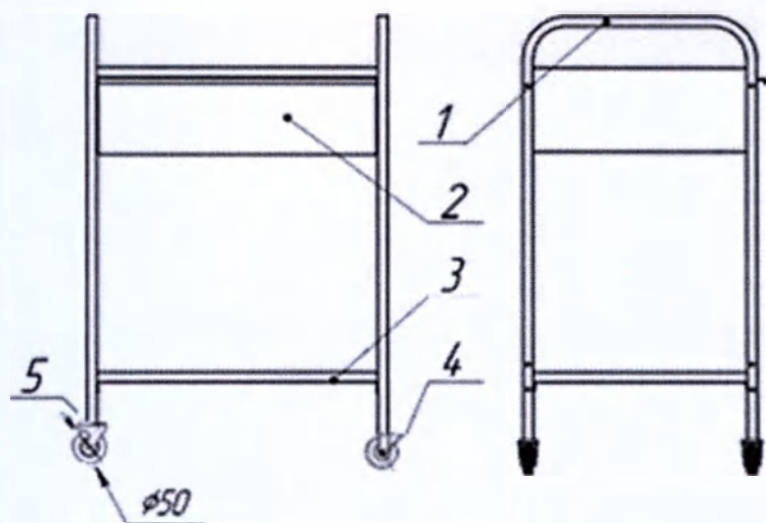


Сборочные единицы:

1. Ручка – 2 шт.;
 2. Корпус с ящиком – 1 шт.;
 3. Полка съемная – 1 шт.;
 4. Колесо – 2 шт.;
 5. Колесо с тормозом – 2 шт.;
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х30 – 12 шт.;
 - гайка М6 – 12 шт.

1. Установить при помощи 8-ми шт. болтов М6х30 и гаек М6 между ручками (1) корпус с ящиком (2).
2. Установить при помощи 4-ех шт. болтов М6х30 и гаек М6 между ручками (1) полку (3).
3. Перевернуть тележку дном вверх и установить 2 колеса с тормозом (5) в резьбовые отверстия к нижней платформе каркаса с левой стороны.
4. Установить остальные 2 колеса (4) в резьбовые отверстия к нижней платформе каркаса
5. Перевернуть тележку на колеса.

Инструкция по сборке Тележки медицинской ТД-05

Сборочные единицы:

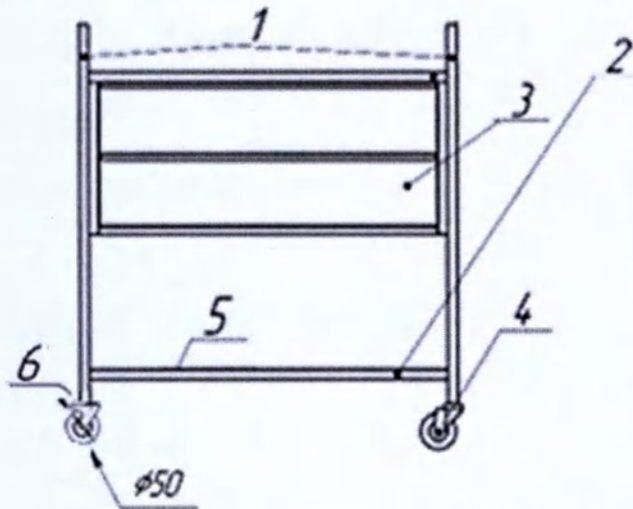


1. Ручка – 2 шт.;
 2. Полка съемная – 2 шт.;
 3. Корпус с ящиками – 1 шт.;
 4. Колесо – 2 шт.;
 5. Рамка – 1 шт.;
 6. Колесо с тормозом – 2 шт.
- Комплект крепежа, в составе:
- болт М6х30 – 12 шт.;
 - гайка М6 – 12 шт.

1. Установить при помощи 8-ми шт. болтов М6х30 и гаек М6 между ручками (1) корпус с ящиками (3).
2. Установить при помощи 4-ех шт. болтов М6х30 и гаек М6 между ручками (1) рамку (5), вложить полки (2).
3. Перевернуть тележку дном вверх и установить 2 колеса с тормозом (6) в резьбовые отверстия к нижней платформе каркаса с левой стороны.
4. Установить остальные 2 колеса (4) в резьбовые отверстия к нижней платформе каркаса
5. Перевернуть тележку на колеса.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Общий вид ТП-01.00

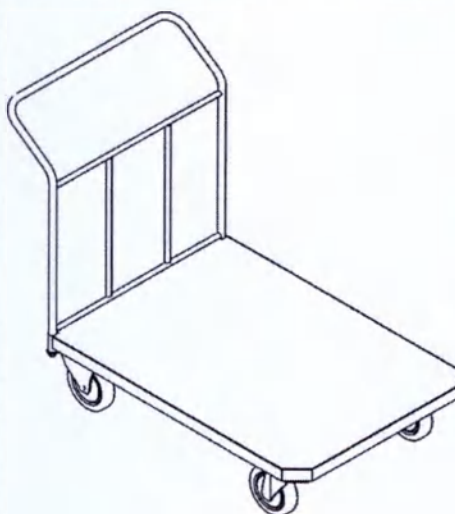

Общий вид ТП-02.00



Общий вид ТП-03.00




Общий вид ТП-04.00



Общий вид ТП-05.00




Общий вид ТП-06.00

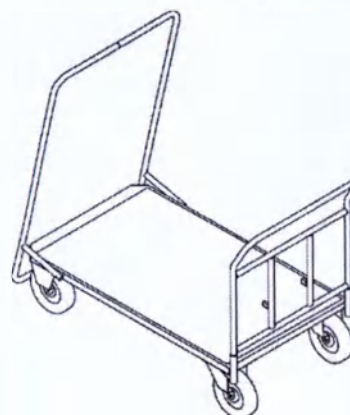


Общий вид ТП-07.00




Общий вид ТП-08.00

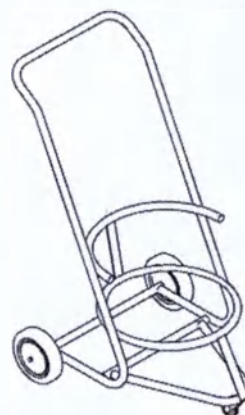

Общий вид ТП-09.00

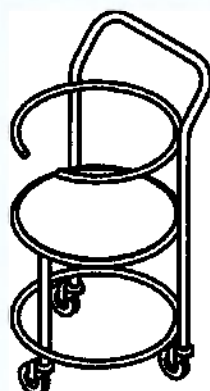


Общий вид ТП-10.00

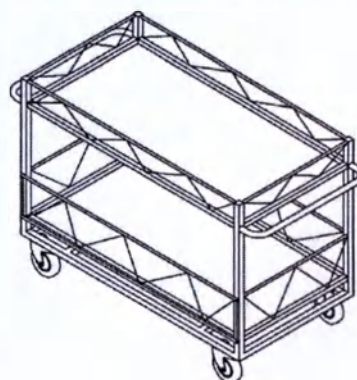

Общий вид ТБ-01.00




Общий вид ТБ-02.00

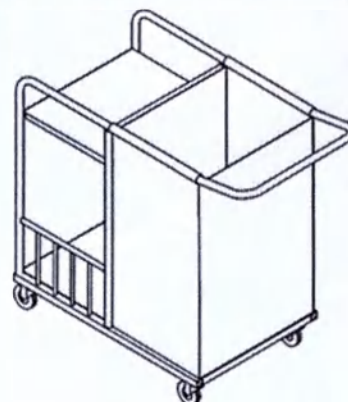


Общий вид ТБ-03.00


Общий вид ТБ-04.00

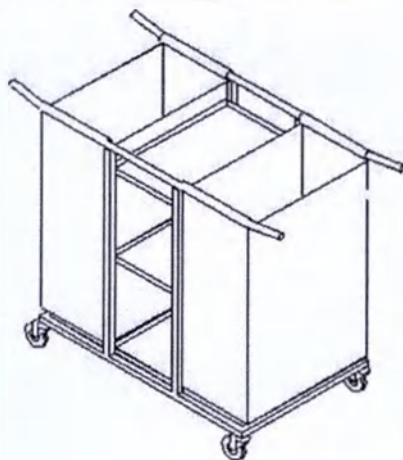


Общий вид ТБ-05.00

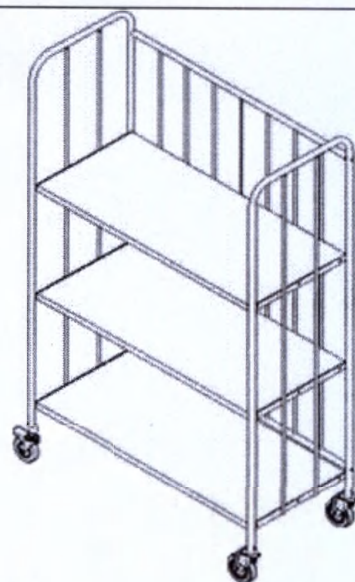


Общий вид ТБ-06.00

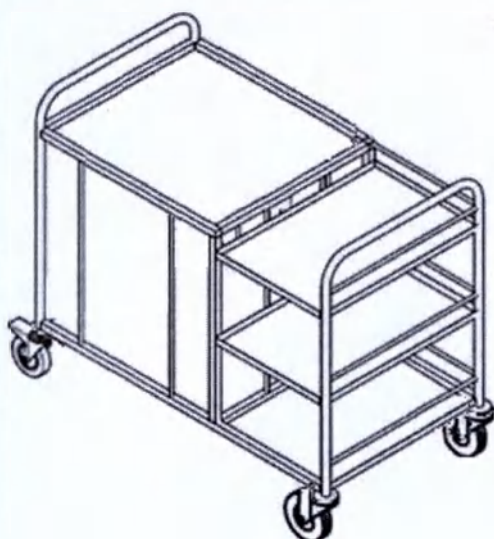


Общий вид ТБ-07.00

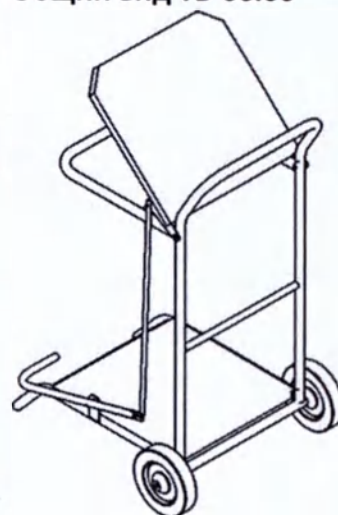

Общий вид ТД-01.00

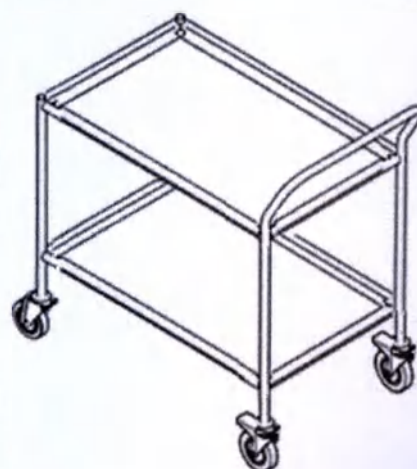

Общий вид ТД-02.00

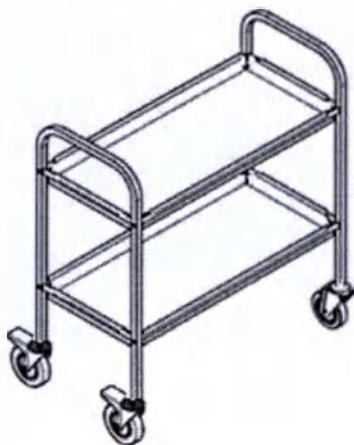

Общий вид ТД-03.00



Общий вид ТД-04.00



Общий вид ТД-05.00



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 49
(сорок девять) листов
ИП Гриневич Л.А.

Подпись Л.А. Гриневич Гриневич Л.А.

