

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СМ-Инвест»



Савченко М.А.

«01» августа 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Материал стоматологический для обработки эмали,
удаления зубного камня и полирования пломб из композитных материалов
«SM Shine»**

по ТУ 9391-014-67200978-2011
ПУ № ФСР 2012/13179 от _____ г.

ПОКАЗАНИЯ

Для профессионального применения в медицинских организациях.

Область применения – стоматология.

Материал стоматологический «SM Shine» представляет собой пасты для обработки эмали, удаления зубного камня и полирования пломб из композитных материалов: паста «SM Shine № 1», паста «SM Shine № 2», паста «SM Shine № 3».

Паста «SM Shine № 1» предназначена для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали.

Паста «SM Shine № 2» предназначена для обработки эмали перед реставрацией или отбеливанием зубов, перед проведением герметизации фиссур, для удаления мягкого налета, пелликулы, а также для профилактики кариеса (профессиональная чистка зубов).

Паста «SM Shine № 3» предназначена для окончательной обработки пломб из композитных и стеклоиономерных материалов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Пасты **SM Shine** содержат мелкодисперсные абразивные наполнители, определяющие полирующие свойства паст, антисептические добавки, биоинертный наполнитель и легко смываемый водой пастообразователь.

Паста «SM Shine № 1» содержит кислотный компонент (лимонная кислота), обеспечивающий быстрое и эффективное размягчение твердых зубных отложений, и абразивный наполнитель для очищения зубов без повреждения эмали.

Паста «SM Shine № 2» содержит в качестве абразива кварц с размером частиц не более 50 мкм.

Паста «SM Shine № 3» содержит абразивы: кварц и корунд (5 мкм), наполнитель и гидрофильный пастообразователь.

Материалы изготовлены для применения в агрессивной биологической среде в диапазоне температур от 32 °С до 42 °С (в условиях полости рта при температуре (37±1) °С и влажности 60-90 %).

Материал стоматологический **SM Shine** относится к неактивным нестерильным медицинским изделиям многократного применения, доза материала используется однократно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением пасты «**SM Shine № 1**» необходимо защитить десну от попадания на нее кислотосодержащей пасты. Пасту нанести точно на область зубных отложений на 3-5 минут. Затем с помощью циркулярной щетки или резиновой насадки на средней скорости без особых усилий провести обработку поверхности зуба. При необходимости процедуру следует повторить со свежей порцией пасты. После очищения смыть пасту водой и провести реминерализацию или фторирование эмали.

Для применения пасты «**SM Shine № 2**» небольшое количество пасты нанести на циркулярную щетку. На средней скорости без особых усилий обработать поверхность или фиссуру зуба. Затем обработанные поверхности следует промыть водой и просушить.

Перед применением пасты «**SM Shine № 3**» следует удалить излишки пломбировочного материала с помощью алмазных головок и пломбу просушить. Затем нанести пасту на рабочую поверхность пламевидной головки или чашечки и без давления на средней скорости обработать поверхность пломбы, добавляя по каплям воду в процессе обработки.

Внимание! После каждого применения тару с материалом необходимо плотно закрывать крышкой. При длительном пребывании в открытом состоянии паста загущается и теряет пластичность. В этом случае к пасте можно добавить несколько капель дистиллированной воды и тщательно перемешать до однородной консистенции.

ФОРМА ВЫПУСКА

Материал стоматологический для обработки эмали, удаления зубного камня и полирования пломб из композитных материалов **SM Shine** выпускается в отдельных упаковках.

Паста «SM Shine № 1»:

шприц (3 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (3 мл, 2 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (5 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (45 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (50 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

Паста «SM Shine № 2»:

шприц (3 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (3 мл, 2 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (5 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (45 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (50 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

Паста «SM Shine № 3»:

шприц (3 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (3 мл, 2 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
шприц (5 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
банка (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

банка (45 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (40 г, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)
туба (50 мл, 1 шт.), инструкция по применению (1 шт.), упаковка (короб или пакет) (1 шт.)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Материал стоматологический **SM Shine** не подлежит периодическому техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Срок годности - 3 года от даты изготовления.

Качество, эффективность и безопасность материала стоматологического **SM Shine** при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, утилизации и инструкции по применению медицинского изделия гарантируется в течение срока годности.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в медицинских организациях для безопасных медицинских отходов класса А.



АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «СМ-Инвест», Корочанская ул., д.132А, офис 16, Белгородская обл., г. Белгород, Россия, 308009,
E-mail: info@smdmt.com

Место производства:

ООО «СМ-Инвест», Березовая ул., д. 1/6, пгт. Северный, Белгородский р-н, Белгородская обл., Россия, 308010

Расшифровка символов:

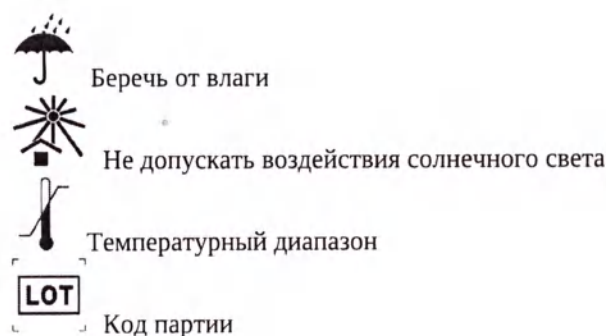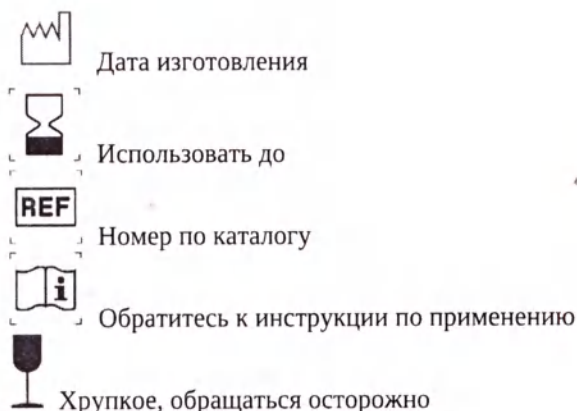

Савченко М.А.

