

ООО «Крейт»

Инструкция по применению МИ

Бандаж согревающий, компрессионный и
фиксирующий для верхних конечностей -
"Крейт" по ТУ 9396-002-96814693-2006



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
10.08 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-600, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», E-600, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-601, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-602, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-622, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-622, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-624, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-624, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитационный период после травм (вывихов, подвывихов, растяжений, ушибов, гематом, отеков) и операций в области плечевого сустава.
- Травмы ключицы, акромиально-ключичного сочленения, лопатки.
- Реабилитация после гипсовой повязки.
- Повышенные нагрузки на плечевой сустав (кроме F-602).
- Перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах и сухожилиях.
- Повреждения связок, нестабильность плечевого сустава.
- Привычные вывихи плеча.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для плечевого сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-600, F-601, F-602

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г ± 20%		
		F-600	F-601	F-602
№ 1	76-82	108,3	100,1	111,5
№ 2	82-88	113,4	105,8	115,1
№ 3	88-94	127,6	115,2	123,2
№ 4	94-100	139,6	126,2	136,3
№ 5	100-106	143,0	136,8	142,1
№ 6	106-112	148,2	142,0	151,2
№ 7	112-118	153,4	153,3	158,2
№ 8	118-124	158,6	162,5	163,4

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-600

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г ± 20%
		E-600
№ 1	48-53	75,8
№ 2	53-58	79,4
№ 3	58-64	89,3
№ 4	64-70	97,7
№ 5	70-76	100,1
№ 6	76-82	103,7
№ 7	82-88	107,4
№ 8	88-94	111,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-622, левый, правый, F-624, левый, правый

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г ± 20%	
		F-622	F-624
№ 1	82-87	172,5	130,0
№ 2	88-93	188,8	142,0
№ 3	94-99	214,1	154,0
№ 4	100-105	218,8	172,0
№ 5	106-111	246,2	181,0
№ 6	112-117	273,6	191,0
№ 7	118-123	301,0	202,0
№ 8	124-129	328,4	215,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-600, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Перфорированный неопрен
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», E-600, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Перфорированный неопрен

Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-601, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Перфорированный неопрен
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-602, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Перфорированный неопрен
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-622, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-622, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-624, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для плечевого сустава – «Крейт», F-624, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на плечевой сустав, зафиксировать его застежками вокруг туловища. Отрегулировать обхват плеча в нижней части бандажа с помощью застежек.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
10.08.2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» по ТУ 9396 – 002 –
96814693 – 2006, следующих исполнений:**

Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт» следующих артикулов:
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-191, размер: M, L, XL, XXL
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-192, размер: M, L, XL, XXL
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-193, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-194, размер: M, L, XL, XXL
Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт», F-205, размер: 1,2
Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт», F-207, размер: 1,2,3
Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт», E-207, размер: 1,2,3,4

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитация после травм запястья, вывихов или подвывихов в лучезапястном, запястно-пястных и первом пястно-фаланговом суставах (кроме F-191, F-194, F-192).
- Острые или хронические воспалительные процессы в области запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти (кроме F-191, F-194, F-192).
- Реабилитация после гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств.
- Синдром де Кервена (кроме F-191, F-194, F-192).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для пястно-фалангового сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-191, F-192, F-194

Размер	Длина пальца, см	Масса, г $\pm 20\%$		
		F-191	F-192	F-194
M	3,5-5,5	8,1	7,9	7,0
L	5,5-8,0	12,4	9,7	8,0
XL	8,0-10,0	14,7	10,3	10,0
XXL	10,0-12,0	16,5	11,8	11,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-193

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$
		F-193
№ 1	14-17	39,3
№ 2	17-20	42,5
№ 3	20-23	48,2
№ 4	23-26	55,6
№ 5	26-29	61,1
№ 6	29-32	68,5

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-205

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$
		F-205
№ 1	14-21	58,0
№ 2	21-28	65,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-207

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$
		F-207
№ 1	14-21	46,3
№ 2	21-28	55,2
№ 3	28-35	64,1

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-207

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$
		E-207
№ 1	10-16	41,9
№ 2	16-22	51,5
№ 3	22-28	61,1
№ 4	28-34	70,7

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-191, размер: M, L, XL, XXL	Металл с мягкой вкладкой
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-192, размер: M, L, XL, XXL	Металл с мягкой вкладкой

Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-193, размер: 1,2,3,4,5,6	Триплированное полотно
Бандаж для пястно-фалангового сустава «Крейт», F-194, размер: M, L, XL, XXL	пластик с мягкой вкладкой
Бандаж для пястно-фалангового сустава - «Крейт», F-205, размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт», F-207, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для пястно-фалангового сустава – «Крейт», E-207, размер: 1,2,3,4	Триплированное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, надеть изделие на пястно-фаланговый сустав и зафиксировать застежками. Обернуть и зафиксировать дополнительную стяжку вокруг запястья (для F-205, F-207, E-207).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
10 12 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:

Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт» следующих артикулов:

- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-220, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-221, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-223, размер: 1,2,3,4,5
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-225, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-226, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-227, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-228, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», E-228, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-229, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-230, размер: 1,2,3
- Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-626, размер: 1,2

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Период реабилитации после травм и операций в области плечевого сустава, плеча, предплечья, лучезапястного сустава и кисти (только для F-220, F-221, F-223, F-225).
- Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, вывихов плеча, "периартриты" плечевого сустава (только для F-626).
- Период реабилитации после травм и операций в области ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, переломов плеча (только для F-226, F-227, F-228, E-228, F-229, F-230).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для плеча и предплечья - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-7.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-220, F-221

Размер	Длина предплечья, см	Масса, г $\pm$ 20%	
		F-220	F-221
№ 1	до 24	75,6	93,2
№ 2	24-28	81,1	99,7
№ 3	от 28	85,3	107,9

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-223

Размер	Длина предплечья, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-223
№ 1	13-16	39,3
№ 2	16-20	48,4
№ 3	20-24	95,0
№ 4	24-28	102,6
№ 5	От 28	110,8

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-225

Размер	Длина предплечья, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-225
№ 1	14-18	35,8
№ 2	18-22	42,1
№ 3	22-26	48,4

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-226, F-228, F-229, F-230

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г $\pm$ 20%			
		F-226	F-228	F-229	F-230
№ 1	84-115	490,0	345,3	219,9	501,3
№ 2	108-125	526,0	384,5	243,7	529,6
№ 3	118-135	562,0	442,7	267,5	590,2

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-227

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-227
№ 1	84-115	490,0
№ 2	108-130	526,0
№ 3	123-145	562,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса E-228

Размер	Обхват над грудью, см	Масса, г ± 20%
		E-228
№ 1	48-62	269,8
№ 2	58-84	312,5
№ 3	80-94	355,2

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-626

Размер	Обхват талии, см	Масса, г ± 20%
		F-626
№ 1	60-140	916,5
№ 2	140-185	1015,6

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-220, размер: 1,2,3	Не эластичный текстильный материал
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-221, размер: 1,2,3	Не эластичный текстильный материал
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-223, размер: 1,2,3,4,5	Не эластичный текстильный материал
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-225, размер: 1,2,3	Не эластичный текстильный материал
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-226, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-227, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-228, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», E-228, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-229, размер: 1,2,3	Не эластичный текстильный материал
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-230, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для плеча и предплечья – «Крейт», F-626, размер: 1,2	Чехол из триплированного полотна, вставка из плотного вспененного материала

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать и расправить изделие. Расположить предплечье в муфте и отрегулировать длину наплечного ремня так, чтобы угол сгибания предплечья в локтевом суставе был равен 90 градусам, если иное не рекомендовано лечащим врачом (для F-220, F-221, F-223, F-225). При надевании изделий F-226, F-227, F-228, E-228, F-229, F-230 наплечные ремни завести за спину и расположить крест-накрест и закрепить их на опорной муфте, далее предплечье расположить в опорной муфте и зафиксировать застежкой, обернуть дополнительную стяжку вокруг туловища и руки, зафиксировать застежкой. Изделие F-226 закрепить на теле при помощи пояса и поддерживающего регулируемого ремня, далее зафиксировать руку на подушке манжетами с застежками.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
10.08.2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ БАНДАЖ ДЛЯ КЛЮЧИЦЫ – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006, следующих исполнений:

Бандаж для ключицы – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для ключицы – «Крейт», F-16, размер: 1,2,3,4,5,6

Бандаж для ключицы – «Крейт», E-16, размер: 1,2,3,4,5,6

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитационный период после поднадкостничных переломов ключицы.
- Реабилитация после оперативного лечения травм ключицы.
- Повреждение связочного аппарата ключично-акромиального сочленения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для ключицы - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-16

Размер	Обхват над грудью, см.	Масса, г $\pm$ 20%
		F-16
№ 1	55-70	97,6
№ 2	70-90	107,3
№ 3	90-115	117,0
№ 4	115-140	128,0
№ 5	140-165	139,0
№ 6	165-180	156,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-16

Размер	Обхват над грудью, см.	Масса, г $\pm$ 20%
		E-16
№ 1	40-55	57,3
№ 2	55-75	72,7
№ 3	75-95	88,1
№ 4	95-115	103,5
№ 5	115-135	118,9
№ 6	135-155	134,3

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для ключицы – «Крейт», F-16, размер: 1,2,3,4,5,6	Триплированное не эластичное полотно
Бандаж для ключицы – «Крейт», E-16, размер: 1,2,3,4,5,6	Триплированное не эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать и расстегнуть изделие, расположить изделие на спине, лямки пропустить через подмышки и зафиксировать застежкой.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693
– 2006, следующих исполнений:**

Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-190, размер: 1,2
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», E-190, размер: 1,2,3,4
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-200, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-201, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-201, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-202, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-202, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-203, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204, левый, размер: 1,2,3
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204, правый, размер: 1,2,3
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204У, размер: 1,2,3
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», E-204, левый, размер: 1,2,3,4
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», E-204, правый, размер: 1,2,3,4
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-206, правый, размер: 1,2,3
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-206, левый, размер: 1,2,3
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-208, размер: 1,2
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-209У, размер: 1,2,3
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-800, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-801, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-802, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-805, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-806, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-807, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-808, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-809, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-810, размер: 1,2,3,4,5,6

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках на руки (только для

- F-190, E-190, F-200, F-203, F-208, У-802, У-806, У-808, У-810, У-800, У-801, У-805, У-807, У-809).
- 2.2. Обострение артроза и артрита лучезапястного сустава.
- 2.3. Легкая и умеренная степень нестабильности лучезапястного сустава (только для F-190, E-190, F-200, F-203, F-208, У-802, У-806, У-808, У-810, У-800, У-801, У-805, У-807, У-809).
- 2.4. Тендиниты и тендовагиниты (только для F-190, E-190, F-200, F-203, F-201, F-202, F-204У, F-204, E-204, F-206, F-209У).
- 2.5. Острые или хронические воспалительные процессы в области запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти (только для F-206).
- 2.6. Период реабилитации после гипсовой повязки, травм и операций.
- 2.7. Бурситы (только для F-190, E-190, F-200, F-203, F-201, F-202, F-204У, F-204, E-204, F-206, F-209У).
- 2.8. Профилактика лечения сгибательных контрактур (только для F-206, F-209У).
- 2.9. Парезы мышц - разгибателей кисти (только для F-206, F-209У).
- 2.10. Остеохондропатия (болезнь Кинбека) (только для F-206, F-204У, F-204, E-204, F-209У, F-201, F-202).
- 2.11. Синдром де Кервена (только для F-206).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для лучезапястного сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-11

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-190, F-208

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm$ 20%	
		F-190	F-208
№ 1	15-23	24,5	21,0
№ 2	23-31	30,4	25,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-190

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm$ 20%
		E-190
№ 1	10-16	16,0
№ 2	16-21	18,0
№ 3	21-26	19,5

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-200, F-203, У-800

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$		
		F-200	F-203	У-800
№ 1	14-16	15,0	15,0	7,4
№2	16-18	15,7	16,1	8,9
№3	18-20	16,7	17,4	9,1
№4	20-22	17,1	18,6	10,6
№ 5	22-24	17,5	19,8	12,1
№ 6	24-26	17,9	21,0	13,6

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-201, правый, левый, F-202, правый, левый

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		F-201	F-202
№ 1	14-16	55,0	88,8
№ 2	16-18	58,0	93,8
№ 3	18-20	61,0	99,9
№ 4	20-22	65,0	106,8
№ 5	22-24	68,0	109,7
№ 6	24-26	71,0	112,6
№ 7	26-28	73,0	118,5
№ 8	28-30	75,0	125,4

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула F -204, правый, левый

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$
		F -204
№ 1	11-15	68,2
№2	15-20	79,5
№3	20-25	90,8

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F -204У, F-206, правый, левый, F-209У

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$		
		F -204У	F-206	F-209У
№ 1	14-21	79,1	102,3	104,8
№2	21-28	88,5	112,3	112,3
№3	28-35	97,9	122,3	119,8

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-204, правый, левый

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$
		E-204
№ 1	11-15	68,2
№2	15-20	79,5
№3	20-25	90,8
№4	25-30	102,1

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-801, У-807

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		У-801	У-807
№ 1	13-16	19,4	33,8
№2	17-20	20,7	36,0

№3	20-23	22,0	38,2
№4	23-25	28,6	40,4
№ 5	25-27	30,2	42,6
№ 6	27-29	31,8	44,8

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-802, У-808

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г ± 20%	
		У-802	У-808
№ 1	15-17	11,0	22,3
№2	17-20	13,0	25,4
№3	20-23	15,0	28,5
№4	23-25	18,0	31,6
№ 5	25-27	20,0	34,7
№ 6	27-29	23,0	37,8

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-805, У-809

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г ± 20%	
		У-805	У-809
№ 1	14,0-16,5	23,8	35,8
№2	16,5-18,5	26,0	37,0
№3	18,5-20,5	28,2	38,2
№4	20,5-23,0	30,4	40,4
№ 5	23,0-25,5	32,6	42,6
№ 6	25,5-27,0	34,8	44,8

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-806, У-810

Размер	Обхват запястья, см	Масса, г ± 20%	
		У-806	У-810
№ 1	13-16	16,0	22,3
№2	16-19	18,0	25,4
№3	19-22	20,0	28,5
№4	22-25	22,0	31,6
№ 5	25-28	24,0	34,7
№ 6	28-31	26,0	37,8

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-190, размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», E-190, размер: 1,2,3,4	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-200, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-201, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-201, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-202, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-202, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-203, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204, левый, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204,	Триплированное полотно

правый: размер: 1,2,3	
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-204У, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», E-204, левый: размер: 1,2,3,4	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», E-204, правый: размер: 1,2,3,4	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-206, правый, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-206, левый, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-208, размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», F-209У, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-800, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-801, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-802, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-805, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-806, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-807, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-808, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-809, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для лучезапястного сустава – «Крейт», У-810, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на лучезапястный сустав и расправить (для У-800, У-801, У-802, У-805, У-806), далее обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать (для У-807, У-808, У-809, У-810). Если изделие с застежкой, то предварительно ослабить застежку, надеть изделие на лучезапястный сустав, зафиксировать изделие застежкой (для F-200, F-201, F-202, F-203, F-208), далее обернуть стяжку вокруг запястья и зафиксировать (для E-190, F-190, F-204, F-204У, E-204, F-206, F-209У).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
_____ 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:**

Бандаж для локтевого сустава – «Крейт» следующих артикулов:

- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-400A, размер: 1,2,3,4,5,6
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-411, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-414, размер: 2,3,4,5,6,7
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», E-414, размер: 1,2,3,4,5,6
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-415, размер: 1,2
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-416, размер: 1,2
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-820, размер: 1,2,3,4,5,6
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-822, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-823, размер: 1,2,3,4,5,6
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-824, размер: 1,2,3,4,5,6
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-825, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-826, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
- Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-827, размер: 1,2,3,4,5,6

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика травм при интенсивных физических нагрузках (только для F-415, F-416, У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826, У-827, F-414, E-414).
- Профилактика воспаления сухожилий мышц предплечья при длительной физической нагрузке (только для F-415, F-416, У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826, У-827, F-414, E-414).
- Травмы, повреждения, хроническое послеоперационное или посттравматическое воспаление локтевого сустава, приводящие к отеку его области и/или синовиту (только для У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826, У-827, F-411).
- Этап реабилитации после повязок, в том числе гипсовых (только для У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826, У-827, F-411).
- Наружный и внутренний эпикондилит (только для F-415, F-416, F-414, E-414).
- Боли в суставе различного происхождения (только для F-400A, F-411, F-414, E-414, У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826, У-827).

- Синовиты и отеки при артрозах и артритах локтевого сустава (кроме F-415, F-416).
- Для профилактического и терапевтического применения во время занятий спортом (кроме F-400A, F-411).
- Нагрузки на локтевой сустав (вибрация, вращение, подъем тяжестей) (только для F-415, F-416, У-820, У-822, У-825, У-826, У-827).
- Артриты, артрозы, миозиты (кроме F-415, F-416).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для локтевого сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-11.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-400A

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-400A
№ 1	22-26	38,0
№2	26-30	42,0
№3	30-34	48,0
№4	34-38	52,0
№ 5	38-42	56,0
№ 6	42-46	60,0

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-411

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-411
№ 1	23-25	55,0
№ 2	25-28	74,1
№ 3	28-31	99,4
№ 4	31-34	98,8
№ 5	34-37	118,3
№ 6	37-40	137,8
№ 7	40-43	157,3
№ 8	43-46	176,8

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-414

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-414

№ 2	15-20	54,0
№ 3	20-25	58,6
№ 4	25-31	64,3
№ 5	31-37	71,4
№ 6	37-43	80,9
№ 7	43-49	94,2

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Е-414

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%
		Е-414
№ 1	16-20	37,6
№ 2	20-24	40,9
№ 3	24-28	44,2
№ 4	28-32	47,5
№ 5	32-36	50,8
№ 6	36-40	54,1

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-415, F-416

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%	
		F-415	F-416
№ 1	21-35	28,7	35,2
№ 2	35-48	38,9	40,3

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-820

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%
		У-820
№ 1	22-25	32,8
№ 2	25-28	34,4
№ 3	28-32	36,1
№ 4	32-36	39,5
№ 5	36-40	42,9
№ 6	40-44	46,3

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-822

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%
		У-822
№ 1	19,0-21,5	34,3
№ 2	22,0-24,5	41,5
№ 3	25,0-27,5	44,1
№ 4	28,0-30,5	47,5
№ 5	31,0-33,5	53,9
№ 6	34,0-36,5	60,3
№ 7	37,0-39,5	66,7
№ 8	40,0-42,5	73,1

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-823

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%
		У-823
№ 1	19-21,5	58,8
№ 2	22-24,5	63,4
№ 3	25-27,5	66,1
№ 4	28-30,5	71,5
№ 5	31-33,5	78,9

№ 6	34-36,5	83,3
-----	---------	------

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-824

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%
		У-824
№ 1	19-22	62,8
№2	22-25	65,4
№3	25-28	66,1
№4	28-32	69,5
№ 5	32-36	72,9
№ 6	36-40	76,3

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-825, У-826

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%	
		У-825	У-826
№ 1	16,5-19,0	74,3	64,3
№ 2	19,0-21,5	78,5	71,5
№ 3	22,0-24,5	81,1	74,1
№ 4	25,0-27,5	87,5	77,5
№ 5	28,0-30,5	93,9	83,9
№ 6	31,0-33,5	100,3	90,3
№ 7	34,0-36,5	106,7	96,7
№ 8	37,0-39,5	113,1	103,1

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-827

Размер	Обхват локтя, см	Масса, г ± 20%
		У-827
№ 1	21 – 23	19,7
№2	23 – 25	20,6
№3	25 – 28	23,2
№4	28 – 31	25,8
№ 5	31 – 34	28,2
№ 6	34 – 37	30,7

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-400А, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-411, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Перфорированный неопрен
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-414, размер: 2,3,4,5,6,7	Эластичное бандажное полотно с перфорацией
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», E-414, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное бандажное полотно с перфорацией
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-415, размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», F-416, размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-820, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-822, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-823, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-824, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-825, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-826, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для локтевого сустава – «Крейт», У-827, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на локтевой сустав (для F-400A, У-820, У-822, У-823, У-824, У-825, У-826, У-827). Если изделие с застежкой, то ослабить застежку надеть изделие на локтевой сустав, зафиксировать изделие застежкой (для F-411, F-414, E-414), далее обернуть стяжку вокруг локтевого сустава и зафиксировать (для F-415, F-416).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 25 лист 06

Должность: Генеральный директор ООО
«Крейт»

Кривицкая И.А.

Подпись
МП

И.А. Кривицкая

Дата:

03.08.23

