


ООО «Крейт»

Инструкция по применению МИ

Бандаж согревающий, компрессионный и
фиксирующий для головы и шеи - "Крейт" по ТУ
9396-002-96814693-2006

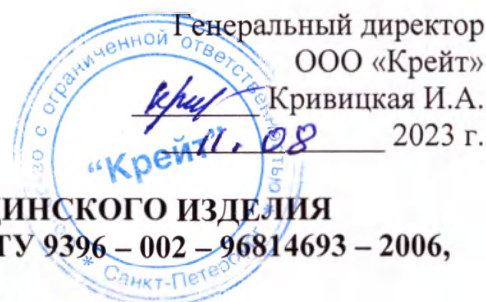

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:**

Бандаж для шейного отдела - «Крейт» следующих артикулов:

- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-300, размер: 1,2,3
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-301, размер: 1,2,3
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-310, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-320, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-321, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-322/БЧ, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-323, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-324, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-330, размер: 1,2,3,4,5
- Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-350, размер: 1,2,3,4,5

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нестабильность шейного отдела позвоночника, синдром вертебро-базилярной недостаточности, сопровождающийся головными болями, головокружениями (кроме F-300, F-301).
- Ушибы, растяжения, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков в остром, подостром и восстановительном периодах (кроме F-300, F-301).
- Остеохондроз и спондилоартроз с болевым и корешковым синдромом (кроме F-300, F-301).
- Межпозвоночные грыжи шейного отдела позвоночника (кроме F-300, F-301).
- Период реабилитации после травм и операций на шейном отделе позвоночника (кроме F-300, F-301).
- Период восстановления после жесткой фиксации шеи и головы (гипсовой повязкой или воротником жесткой фиксации) (кроме F-300, F-301).
- Профилактика перенапряжения мышц шеи у здоровых людей при длительной сидячей работе, поездках и т.д. (кроме F-300, F-301).
- Период реабилитации после черепно-мозговых травм.
- Родовая черепно-спинальная травма и нарушения мозгового кровообращения у новорожденных (только для F-300, F-301).
- Вакуум-экстракция ребенка, наложение акушерских щипцов (только для F-300, F-301).

- В комплексном лечении мышечной кривошеи (только для F-300, F-301).
- Патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича (только для F-300, F-301).
- Гиперкинезы в шейном отделе позвоночника (только для F-300, F-301, F-310, F-320, F-322/БЧ, F-323, F-324).
- Остеохондропатии и дисплазии шейного отдела позвоночника (только для F-300, F-301, F-310, F-320, F-322/БЧ, F-323, F-324).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для шейного отдела - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-300

Размер	Высота шеи, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-300
№ 1	4,0	13,9
№ 2	4,5	18,9
№ 3	5,0	23,9

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-301

Размер	Высота шеи, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-301
№ 1	2,5	10,0
№ 2	3,5	13,0
№ 3	4,0	15,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-310

Размер	Высота шеи, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-310
№ 1	6,0	18,0
№ 2	7,0	22,3
№ 3	8,0	35,4
№ 4	9,0	37,2
№ 5	10,0	44,7
№ 6	11,0	49,6
№ 7	12,0	57,8
№ 8	13,0	66,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-320, F-321, F-322/БЧ, F-323, F-324

Размер	Высота шеи, см	Масса, г ± 20%				
		F-320	F-321	F-322/БЧ	F-323	F-324
№ 6	6,0	54,2	61,5	50,0	44,6	53,0
№ 7	7,0	65,9	66,8	53,1	45,9	56,1
№ 8	8,0	67,1	71,1	56,2	47,2	57,8
№ 9	9,0	81,6	75,4	57,9	59,7	59,2
№ 10	10,0	90,1	79,7	59,3	62,9	65,0
№ 11	11,0	102,8	89,4	66,5	70,1	69,5
№ 12	12,0	109,5	99,1	69,6	76,0	72,6
№ 13	13,0	116,2	108,8	72,7	81,9	77,5

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-330, F-350

Размер	Обхват шеи, см	Масса, г ± 20%	
		F-330	F-350
№ 1	27-31	82,0	75,1
№ 2	31-35	95,3	85,5
№ 3	35-39	102,0	95,0
№ 4	39-43	116,3	113,3
№ 5	43-47	130,6	122,6

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-300, размер: 1,2,3	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-301, размер: 1,2,3	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-310, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-320, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-321, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-322/БЧ, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-323, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13	Трикотажное полотно со вставкой из мягкого вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-324, размер: 6,7,8,9,10,11,12,13	Трикотажное полотно со вставкой из плотного вспененного материала
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-330, размер: 1,2,3,4,5	Пластик
Бандаж для шейного отдела - «Крейт», F-350, размер: 1,2,3,4,5	Пластик

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Отрегулировать высоту изделия (для F-330, F-350). Надеть и расправить изделие, зафиксировать изделие с помощью застежки.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.


Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ

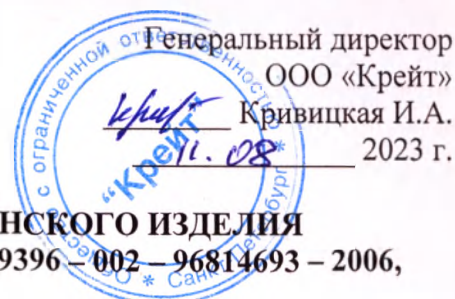

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ГОЛОВЫ И ЛИЦА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:

Бандаж для головы и лица – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для головы и лица – «Крейт», F-100, размер: 1,2,3,4,5,6

Бандаж для головы и лица – «Крейт», F-101, размер: 1,2,3,4,5,6

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Реабилитационный период после операций на лице и шее.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для головы и лица - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-100, F-101

Размер	Обхват головы, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		F-100	F-101
№ 1	50-52	48,4	16,2
№ 2	52-54	51,6	17,3
№ 3	54-56	59,6	18,0
№ 4	56-58	63,8	21,7
№ 5	58-60	69,8	23,4
№ 6	60-62	75,2	25,1

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для головы и лица – «Крейт», F-100, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно
Бандаж для головы и лица – «Крейт», F-101, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть и расправить изделие, зафиксировать на голове с помощью застежки.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.
Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Прошито, пронумеровано и скреплено		
печатью	8	лист 06
Должность: Генеральный директор ООО «Крейт»		
Кривицкая И.А.		
Подпись		
МП	<i>Крив</i>	
Дата:	03.02.2023.	