


[별지 제41호 서식]

Registered No. 2024 - 3722

NOTARIAL CERTIFICATE

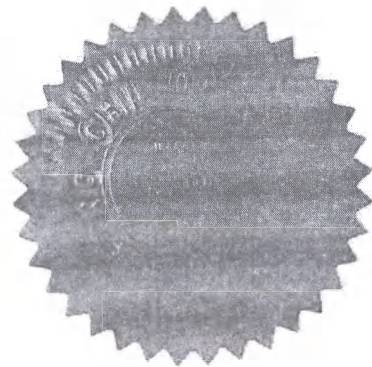

Byeong Chil. Jung Notary's Office

Address : Woobang Jukjeon Town Apartment Store #205,
160 Yongsan-ro, Dalseo-gu, Daegu

공증인 정 병 칠 사무소 ☎:(053)561-2277~8 FAX:(053)561-2279



APPROVED BY
Assistant Manager
Sang-Hoon Yeo

[Signature]

« » 25th October 2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Абатменты для дентальных имплантатов, в вариантах исполнения
(Evidence Implant Inc. (Евиденс Имплант Инк.), Республика Корея)



2024

Оглавление

1.	Наименование изделия, информация о производителе, классификация.	3
	Производитель	3
	Место производства	41
2.	Назначение и применение изделия	41
	Назначение	41
	Вид контакта с организмом	41
	Условия применения	41
	Потенциальные потребители медицинского изделия	41
3.	Особые свойства изделия	41
	Принцип действия	41
	Описание изделия	41
4.	Общие показания, противопоказания и побочные эффекты	45
	Показания:	45
	Противопоказания:	45
	Потенциальные осложнения	45
5.	Предупреждения и меры предосторожности	46
	Предупреждения	46
	Меры предосторожности	47
6.	Инструкции по применению	47
7.	Техническая спецификация	49
	Комплект поставки изделия	80
8.	Маркировка и упаковка	118
9.	Соответствие стандартам Российской Федерации	119
10.	Транспортирование, хранение и эксплуатация	119
11.	Сведения о стерильности изделия	119
12.	Сведения об утилизации	120
13.	Гарантии	120

1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация

Наименование медицинского изделия

Абатменты для зубных имплантатов, в вариантах исполнения:

1 Абатмент временный BLT OS

1.1 Абатмент временный BLT OS OTAM4017, в составе:

- Абатмент OTAM4017– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.2 Абатмент временный BLT OS OTAM4037, в составе:

- Абатмент OTAM4037– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.3 Абатмент временный BLT OS OTAM4057, в составе:

- Абатмент OTAM4057– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.4 Абатмент временный BLT OS OTAMN4017, в составе:

- Абатмент OTAMN4017– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.5 Абатмент временный BLT OS OTAMN4037, в составе:

- Абатмент OTAMN4037– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.6 Абатмент временный BLT OS OTAMN4057, в составе:

- Абатмент OTAMN4057– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.7 Абатмент временный BLT OS OTAR417, в составе:

- Абатмент OTAR417– 1 шт.

- Винт ONOASR– 1 шт.

- Инструкция по применению

1.8 Абатмент временный BLT OS OTAR437, в составе:

- Абатмент OTAR437– 1 шт.

- Винт ONOASR– 1 шт.

- Инструкция по применению

1.9 Абатмент временный BLT OS OTAR457, в составе:

- Абатмент OTAR457– 1 шт.

- Винт ONOASR– 1 шт.

- Инструкция по применению

1.10 Абатмент временный BLT OS OTARN417, в составе:

- Абатмент OTARN417– 1 шт.
- Винт ONOASR– 1 шт.
- Инструкция по применению

1.11 Абатмент временный BLT OS OTARN437, в составе:

- Абатмент OTARN437– 1 шт.
- Винт ONOASR– 1 шт.
- Инструкция по применению

1.12 Абатмент временный BLT OS OTARN457, в составе:

- Абатмент OTARN457– 1 шт.
- Винт ONOASR– 1 шт.
- Инструкция по применению

2 Абатмент BLT OS BestDuo

2.1 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3515, в составе:

- Абатмент ONOAM3515– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.2 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3517, в составе:

- Абатмент ONOAM3517– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.3 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3525, в составе:

- Абатмент ONOAM3525– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.4 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3527, в составе:

- Абатмент ONOAM3527– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.5 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3535, в составе:

- Абатмент ONOAM3535– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.6 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3537, в составе:

- Абатмент ONOAM3537– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.7 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3545, в составе:

- Абатмент ONOAM3545– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.8 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3547, в составе:
 - Абатмент ONOAM3547– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.9 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3555, в составе:
 - Абатмент ONOAM3555– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.10 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3557, в составе:
 - Абатмент ONOAM3557– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.11 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4015, в составе:
 - Абатмент ONOAM4015– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.12 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4017, в составе:
 - Абатмент ONOAM4017– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.13 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4025, в составе:
 - Абатмент ONOAM4025– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.14 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4027, в составе:
 - Абатмент ONOAM4027– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.15 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4035, в составе:
 - Абатмент ONOAM4035– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.16 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4037, в составе:
 - Абатмент ONOAM4037– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.17 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4045, в составе:
 - Абатмент ONOAM4045– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.18 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4047, в составе:
 - Абатмент ONOAM4047– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.19 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4055, в составе:
 - Абатмент ONOAM4055– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.20 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4057, в составе:
 - Абатмент ONOAM4057– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.21 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3515, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3515– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.22 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3517, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3517– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.23 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3525, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3525– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.24 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3527, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3527– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.25 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3535, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3535– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.26 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3537, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3537– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.27 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3545, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3545– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.28 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3547, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3547– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.29 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3555, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3555– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.30 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3557, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3557– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.31 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4015, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4015– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.32 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4017, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4017– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.33 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4025, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4025– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.34 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4027, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4027– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.35 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4035, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4035– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.36 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4037, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4037– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.37 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4045, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4045– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.38 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4047, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4047– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.39 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4055, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4055– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.40 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4057, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4057– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.41 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR415, в составе:
 - Абатмент ONOAR 415– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.42 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR417, в составе:
 - Абатмент ONOAR 417– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.43 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR425, в составе:
 - Абатмент ONOAR 425– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.44 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR427, в составе:
 - Абатмент ONOAR 427– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.45 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR435, в составе:
 - Абатмент ONOAR 435– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.46 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR437, в составе:
 - Абатмент ONOAR 437– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.47 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR445, в составе:
 - Абатмент ONOAR 445– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.48 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR447, в составе:

- Абатмент ONOAR 447– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.49 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR455, в составе:

- Абатмент ONOAR 455– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.50 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR457, в составе:

- Абатмент ONOAR 457– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.51 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR515, в составе:

- Абатмент ONOAR 515– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.52 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR517, в составе:

- Абатмент ONOAR 517– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.53 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR525, в составе:

- Абатмент ONOAR 525– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.54 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR527, в составе:

- Абатмент ONOAR 527– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.55 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR535, в составе:

- Абатмент ONOAR 535– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.56 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR537, в составе:

- Абатмент ONOAR 537– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению

2.57 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR545, в составе:

- Абатмент ONOAR 545– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.58 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR547, в составе:
 - Абатмент ONOAR 547– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.59 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR555, в составе:
 - Абатмент ONOAR 555– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.60 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR557, в составе:
 - Абатмент ONOAR 557– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.61 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR615, в составе:
 - Абатмент ONOAR 615– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.62 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR617, в составе:
 - Абатмент ONOAR617– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.63 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR625, в составе:
 - Абатмент ONOAR625– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.64 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR627, в составе:
 - Абатмент ONOAR627– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.65 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR635, в составе:
 - Абатмент ONOAR635– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.66 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR637, в составе:
 - Абатмент ONOAR637– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.67 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR645, в составе:
 - Абатмент ONOAR645– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.68 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR647, в составе:
 - Абатмент ONOAR647– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.69 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR655, в составе:
 - Абатмент ONOAR655– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.70 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR657, в составе:
 - Абатмент ONOAR657– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.71 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN415, в составе:
 - Абатмент ONOARN415– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.72 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN417, в составе:
 - Абатмент ONOARN417– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.73 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN425, в составе:
 - Абатмент ONOARN425– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.74 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN427, в составе:
 - Абатмент ONOARN427– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.75 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN435, в составе:
 - Абатмент ONOARN435– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.76 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN437, в составе:
 - Абатмент ONOARN437– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.77 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN445, в составе:
 - Абатмент ONOARN445– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.78 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN447, в составе:
 - Абатмент ONOARN447– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.79 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN455, в составе:
 - Абатмент ONOARN455– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.80 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN457, в составе:
 - Абатмент ONOARN457– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.81 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN515, в составе:
 - Абатмент ONOARN515– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.82 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN517, в составе:
 - Абатмент ONOARN517– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.83 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN525, в составе:
 - Абатмент ONOARN525– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.84 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN527, в составе:
 - Абатмент ONOARN527– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.85 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN535, в составе:
 - Абатмент ONOARN535– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.86 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN537, в составе:
 - Абатмент ONOARN537– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.87 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN545, в составе:
 - Абатмент ONOARN545– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.88 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN547, в составе:
 - Абатмент ONOARN547– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.89 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN555, в составе:
 - Абатмент ONOARN555– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.90 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN557, в составе:
 - Абатмент ONOARN557– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.91 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN615, в составе:
 - Абатмент ONOARN615– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.92 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN617, в составе:
 - Абатмент ONOARN617– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.93 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN625, в составе:
 - Абатмент ONOARN625– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.94 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN627, в составе:
 - Абатмент ONOARN627– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.95 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN635, в составе:
 - Абатмент ONOARN635– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.96 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN637, в составе:
 - Абатмент ONOARN637– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.97 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN645, в составе:
 - Абатмент ONOARN645– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.98 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN647, в составе:
 - Абатмент ONOARN647– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.99 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN655, в составе:
 - Абатмент ONOARN655– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.100 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN657, в составе:
 - Абатмент ONOARN657– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3 Абатмент BLT OS BestAngled
- 3.1 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3511, в составе:
 - Абатмент OBAAM3511– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.2 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3512, в составе:
 - Абатмент OBAAM3512– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.3 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3521, в составе:
 - Абатмент OBAAM3521– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.4 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3522, в составе:
 - Абатмент OBAAM3522– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.5 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3531, в составе:
 - Абатмент OBAAM3531– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.6 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3532, в составе:
 - Абатмент OBAAM3532– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.7 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4011, в составе:
 - Абатмент OBAAM4011– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.8 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4012, в составе:
 - Абатмент OBAAM4012– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.9 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4021, в составе:
 - Абатмент OBAAM4021– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.10 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4022, в составе:
 - Абатмент OBAAM4022– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.11 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4031, в составе:
 - Абатмент OBAAM4031– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.12 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4032, в составе:
 - Абатмент OBAAM4032– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.13 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4041, в составе:
 - Абатмент OBAAM4041– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.14 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4042, в составе:
 - Абатмент OBAAM4042– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.15 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4051, в составе:
 - Абатмент OBAAM4051– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.16 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4052, в составе:
 - Абатмент OBAAM4052– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.17 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3511, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3511– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.18 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3512, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3512– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.19 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3521, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3521– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.20 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3522, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3522– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.21 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3531, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3531– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.22 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3532, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3532– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.23 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4011, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4011– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.24 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4012, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4012– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.25 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4021, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4021– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.26 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4022, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4022– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.27 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4031, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4031– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.28 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4032, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4032– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.29 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4041, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4041– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.30 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4042, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4042– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.31 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4051, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4051– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.32 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4052, в составе:
 - Абатмент OBA OBAAMNAM 4052– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.33 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR411, в составе:
 - Абатмент OBAAR411– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.34 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR412, в составе:
 - Абатмент OBAAR412– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.35 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR421, в составе:
 - Абатмент OBAAR421– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.36 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR422, в составе:
 - Абатмент OBAAR422– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.37 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR431, в составе:
 - Абатмент OBAAR431– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.38 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR432, в составе:
 - Абатмент OBAAR432– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.39 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR441, в составе:
 - Абатмент OBAAR441– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.40 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR442, в составе:
 - Абатмент OBAAR442– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.41 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR451, в составе:
 - Абатмент OBAAR451– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.42 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR452, в составе:
 - Абатмент OBAAR452– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.43 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN411, в составе:
 - Абатмент OBAARN411– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.44 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN412, в составе:
 - Абатмент OBAARN412– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.45 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN421, в составе:
 - Абатмент OBAARN421– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.46 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN422, в составе:
 - Абатмент OBAARN422– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.47 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN431, в составе:
 - Абатмент OBAARN431– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.48 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN432, в составе:
 - Абатмент OBAARN432– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.49 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN441, в составе:
 - Абатмент OBAARN441– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.50 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN442, в составе:
 - Абатмент OBAARN442– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.51 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN451, в составе:
 - Абатмент OBAARN451– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.52 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN452, в составе:
 - Абатмент OBAARN452– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4 Абатмент BLT OS CCM
- 4.1 Абатмент BLT OS CCM OCUMC40, в составе:
 - Абатмент OCUMC40– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4.2 Абатмент BLT OS CCM OCUMB40, в составе:
 - Абатмент OCUMB40– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4.3 Абатмент BLT OS CCM OCURB, в составе:
 - Абатмент OCURB – 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4.4 Абатмент BLT OS CCM OCURC, в составе:
 - Абатмент OCURC – 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 5 Абатмент Precision CCM UCLA

5.1 Абатмент Precision CCM UCLA EICUB, в составе:

- Абатмент EICUB – 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению

5.2 Абатмент Precision CCM UCLA EICUC, в составе:

- Абатмент EICUC – 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению

6 Абатмент BLT OS BestOcta

6.1 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA411, в составе:

- Абатмент OBOA411– 1 шт.

- Инструкция по применению

6.2 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA421, в составе:

- Абатмент OBOA421– 1 шт.

- Инструкция по применению

6.3 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA431, в составе:

- Абатмент OBOA431– 1 шт.

- Инструкция по применению

6.4 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA441, в составе:

- Абатмент OBOA441– 1 шт.

- Инструкция по применению

6.5 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA451, в составе:

- Абатмент OBOA451– 1 шт.

- Инструкция по применению

7 Абатмент съемный BLT OS

7.1 Абатмент съемный BLT OS OLOM401, в составе:

- Абатмент OLOM401– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.2 Абатмент съемный BLT OS OLOM402, в составе:

- Абатмент OLOM402– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.3 Абатмент съемный BLT OS OLOM403, в составе:

- Абатмент OLOM403– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.4 Абатмент съемный BLT OS OLOM404, в составе:

- Абатмент OLOM404– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.5 Абатмент съемный BLT OS OLOM405, в составе:

- Абатмент OLOM405– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.6 Абатмент съемный BLT OS OLOR481, в составе:

- Абатмент OLOR481– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.7 Абатмент съемный BLT OS OLOR482, в составе:

- Абатмент OLOR482– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.8 Абатмент съемный BLT OS OLOR483, в составе:

- Абатмент OLOR483– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.9 Абатмент съемный BLT OS OLOR484, в составе:

- Абатмент OLOR484– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.10 Абатмент съемный BLT OS OLOR485, в составе:

- Абатмент OLOR485– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.11 Абатмент съемный BLT OS OLOR486, в составе:

- Абатмент OLOR486– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.12 Абатмент съемный BLT OS OLOR381, в составе:

- Абатмент OLOR381– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.13 Абатмент съемный BLT OS OLOR382, в составе:

- Абатмент OLOR382– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.14 Абатмент съемный BLT OS OLOR383, в составе:

- Абатмент OLOR383– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.15 Абатмент съемный BLT OS OLOR384, в составе:

- Абатмент OLOR384– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.16 Абатмент съемный BLT OS OLOR385, в составе:

- Абатмент OLOR385– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.17 Абатмент съемный BLT OS OLOR386, в составе:

- Абатмент OLOR386– 1 шт.
- Инструкция по применению

8 Абатмент EpDuo

8.1 Абатмент EpDuo NEA505, в составе:

- Абатмент NEA505– 1 шт.
- Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.2 Абатмент EpDuo NEA507, в составе:
 - Абатмент NEA507– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.3 Абатмент EpDuo NEA515, в составе:
 - Абатмент NEA515– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.4 Абатмент EpDuo NEA516, в составе:
 - Абатмент NEA516– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.5 Абатмент EpDuo NEA517, в составе:
 - Абатмент NEA517– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.6 Абатмент EpDuo NEA525, в составе:
 - Абатмент NEA525– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.7 Абатмент EpDuo NEA526, в составе:
 - Абатмент NEA526– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.8 Абатмент EpDuo NEA527, в составе:
 - Абатмент NEA527– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.9 Абатмент EpDuo NEA535, в составе:
 - Абатмент NEA535– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.10 Абатмент EpDuo NEA536, в составе:
 - Абатмент NEA536– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.11 Абатмент EpDuo NEA537, в составе:
 - Абатмент NEA537– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.12 Абатмент ЕрDuo NEA545, в составе:
 - Абатмент NEA545– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.13 Абатмент ЕрDuo NEA546, в составе:
 - Абатмент NEA546– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.14 Абатмент ЕрDuo NEA547, в составе:
 - Абатмент NEA547– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.15 Абатмент ЕрDuo NEA555, в составе:
 - Абатмент NEA555– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.16 Абатмент ЕрDuo NEA556, в составе:
 - Абатмент NEA556– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.17 Абатмент ЕрDuo NEA557, в составе:
 - Абатмент NEA557– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.18 Абатмент ЕрDuo NEA605, в составе:
 - Абатмент NEA605– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.19 Абатмент ЕрDuo NEA607, в составе:
 - Абатмент NEA607– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.20 Абатмент ЕрDuo NEA615, в составе:
 - Абатмент NEA615– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.21 Абатмент ЕрDuo NEA616, в составе:
 - Абатмент NEA616– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.22 Абатмент EpDuo NEA617, в составе:
 - Абатмент NEA617– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.23 Абатмент EpDuo NEA625, в составе:
 - Абатмент NEA625– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.24 Абатмент EpDuo NEA626, в составе:
 - Абатмент NEA626– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.25 Абатмент EpDuo NEA627, в составе:
 - Абатмент NEA627– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.26 Абатмент EpDuo NEA635, в составе:
 - Абатмент NEA635– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.27 Абатмент EpDuo NEA636, в составе:
 - Абатмент NEA636– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.28 Абатмент EpDuo NEA637, в составе:
 - Абатмент NEA637– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.29 Абатмент EpDuo NEA645, в составе:
 - Абатмент NEA645– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.30 Абатмент EpDuo NEA646, в составе:
 - Абатмент NEA646– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.31 Абатмент EpDuo NEA647, в составе:
 - Абатмент NEA647– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.32 Абатмент ЕрDuo NEA655, в составе:
 - Абатмент NEA655– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.33 Абатмент ЕрDuo NEA656, в составе:
 - Абатмент NEA656– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.34 Абатмент ЕрDuo NEA657, в составе:
 - Абатмент NEA657– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.35 Абатмент ЕрDuo NEA715, в составе:
 - Абатмент NEA715– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.36 Абатмент ЕрDuo NEA716, в составе:
 - Абатмент NEA716– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.37 Абатмент ЕрDuo NEA717, в составе:
 - Абатмент NEA717– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.38 Абатмент ЕрDuo NEA725, в составе:
 - Абатмент NEA725– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.39 Абатмент ЕрDuo NEA726, в составе:
 - Абатмент NEA726– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.40 Абатмент ЕрDuo NEA727, в составе:
 - Абатмент NEA727– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.41 Абатмент ЕрDuo NEA735, в составе:
 - Абатмент NEA735– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.42 Абатмент EpDuo NEA736, в составе:
 - Абатмент NEA736– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.43 Абатмент EpDuo NEA737, в составе:
 - Абатмент NEA737– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.44 Абатмент EpDuo NEA745, в составе:
 - Абатмент NEA745– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.45 Абатмент EpDuo NEA746, в составе:
 - Абатмент NEA746– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.46 Абатмент EpDuo NEA747, в составе:
 - Абатмент NEA747– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.47 Абатмент EpDuo NEA755, в составе:
 - Абатмент NEA755– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.48 Абатмент EpDuo NEA756, в составе:
 - Абатмент NEA756– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.49 Абатмент EpDuo NEA757, в составе:
 - Абатмент NEA757– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.50 Абатмент EpDuo NEALK405, в составе:
 - Абатмент NEALK405– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.51 Абатмент EpDuo NEALK505, в составе:
 - Абатмент NEALK505– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.52 Абатмент ЕрDuo NEALKN405, в составе:
 - Абатмент NEALKN405– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.53 Абатмент ЕрDuo NEALKN505, в составе:
 - Абатмент NEALKN505– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.54 Абатмент ЕрDuo NEAN505, в составе:
 - Абатмент NEAN505– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.55 Абатмент ЕрDuo NEAN507, в составе:
 - Абатмент NEAN507– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.56 Абатмент ЕрDuo NEAN515, в составе:
 - Абатмент NEAN515– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.57 Абатмент ЕрDuo NEAN516, в составе:
 - Абатмент NEAN516– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.58 Абатмент ЕрDuo NEAN517, в составе:
 - Абатмент NEAN517– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.59 Абатмент ЕрDuo NEAN525, в составе:
 - Абатмент NEAN525– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.60 Абатмент ЕрDuo NEAN526, в составе:
 - Абатмент NEAN526– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.61 Абатмент ЕрDuo NEAN527, в составе:
 - Абатмент NEAN527– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.62 Абатмент EpDuo NEAN535, в составе:
 - Абатмент NEAN535– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.63 Абатмент EpDuo NEAN536, в составе:
 - Абатмент NEAN536– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.64 Абатмент EpDuo NEAN537, в составе:
 - Абатмент NEAN537– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.65 Абатмент EpDuo NEAN545, в составе:
 - Абатмент NEAN545– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.66 Абатмент EpDuo NEAN546, в составе:
 - Абатмент NEAN546– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.67 Абатмент EpDuo NEAN547, в составе:
 - Абатмент NEAN547– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.68 Абатмент EpDuo NEAN555, в составе:
 - Абатмент NEAN555– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.69 Абатмент EpDuo NEAN556, в составе:
 - Абатмент NEAN556– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.70 Абатмент EpDuo NEAN557, в составе:
 - Абатмент NEAN557– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.71 Абатмент EpDuo NEAN605, в составе:
 - Абатмент NEAN605– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.72 Абатмент ЕрDuo NEAN607, в составе:
 - Абатмент NEAN607– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.73 Абатмент ЕрDuo NEAN615, в составе:
 - Абатмент NEAN615– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.74 Абатмент ЕрDuo NEAN616, в составе:
 - Абатмент NEAN616– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.75 Абатмент ЕрDuo NEAN617, в составе:
 - Абатмент NEAN617– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.76 Абатмент ЕрDuo NEAN625, в составе:
 - Абатмент NEAN625– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.77 Абатмент ЕрDuo NEAN626, в составе:
 - Абатмент NEAN626– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.78 Абатмент ЕрDuo NEAN627, в составе:
 - Абатмент NEAN627– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.79 Абатмент ЕрDuo NEAN635, в составе:
 - Абатмент NEAN635– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.80 Абатмент ЕрDuo NEAN636, в составе:
 - Абатмент NEAN636– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.81 Абатмент ЕрDuo NEAN637, в составе:
 - Абатмент NEAN637– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.82 Абатмент EpDuo NEAN645, в составе:
 - Абатмент NEAN645– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.83 Абатмент EpDuo NEAN646, в составе:
 - Абатмент NEAN646– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.84 Абатмент EpDuo NEAN647, в составе:
 - Абатмент NEAN647– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.85 Абатмент EpDuo NEAN655, в составе:
 - Абатмент NEAN655– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.86 Абатмент EpDuo NEAN656, в составе:
 - Абатмент NEAN656– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.87 Абатмент EpDuo NEAN657, в составе:
 - Абатмент NEAN657– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.88 Абатмент EpDuo NEAN715, в составе:
 - Абатмент NEAN715– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.89 Абатмент EpDuo NEAN716, в составе:
 - Абатмент NEAN716– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.90 Абатмент EpDuo NEAN717, в составе:
 - Абатмент NEAN717– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.91 Абатмент EpDuo NEAN725, в составе:
 - Абатмент NEAN725– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.92 Абатмент ЕрDuo NEAN726, в составе:
 - Абатмент NEAN726– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.93 Абатмент ЕрDuo NEAN727, в составе:
 - Абатмент NEAN727– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.94 Абатмент ЕрDuo NEAN735, в составе:
 - Абатмент NEAN735– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.95 Абатмент ЕрDuo NEAN736, в составе:
 - Абатмент NEAN736– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.96 Абатмент ЕрDuo NEAN737, в составе:
 - Абатмент NEAN737– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.97 Абатмент ЕрDuo NEAN745, в составе:
 - Абатмент NEAN745– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.98 Абатмент ЕрDuo NEAN746, в составе:
 - Абатмент NEAN746– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.99 Абатмент ЕрDuo NEAN747, в составе:
 - Абатмент NEAN747– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.100 Абатмент ЕрDuo NEAN755, в составе:
 - Абатмент NEAN755– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.101 Абатмент ЕрDuo NEAN756, в составе:
 - Абатмент NEAN756– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.102 Абатмент EpDuo NEAN757, в составе:
 - Абатмент NEAN757– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 9 Абатмент угловой
 - 9.1 Абатмент угловой SAAR15, в составе:
 - Абатмент SAAR15– 1 шт.
 - Винт SAARS – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 9.2 Абатмент угловой SAAR25, в составе:
 - Абатмент SAAR25– 1 шт.
 - Винт SAARS – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 9.3 Абатмент угловой SAARN15, в составе:
 - Абатмент SAARN15– 1 шт.
 - Винт SAARS – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 9.4 Абатмент угловой SAARN25, в составе:
 - Абатмент SAARN25– 1 шт.
 - Винт SAARS – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10 Абатмент BLT OS BestSolid
 - 10.1 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3514, в составе:
 - Абатмент ONSAM3514– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 10.2 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3517, в составе:
 - Абатмент ONSAM3517– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 10.3 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3524, в составе:
 - Абатмент ONSAM3524– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 10.4 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3527, в составе:
 - Абатмент ONSAM3527– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 10.5 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3534, в составе:

- Абатмент ONSAM3534– 1 шт.
- Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.6 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3537, в составе:
 - Абатмент ONSAM3537– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.7 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3544, в составе:
 - Абатмент ONSAM3544– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.8 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3547, в составе:
 - Абатмент ONSAM3547– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.9 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3554, в составе:
 - Абатмент ONSAM3554– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.10 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3557, в составе:
 - Абатмент ONSAM3557– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.11 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4014, в составе:
 - Абатмент ONSAM4014– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.12 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4017, в составе:
 - Абатмент ONSAM4017– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.13 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4024, в составе:
 - Абатмент ONSAM4024– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.14 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4027, в составе:
 - Абатмент ONSAM4027– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.15 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4034, в составе:

- Абатмент ONSAM4034– 1 шт.
- Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.16 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4037, в составе:
 - Абатмент ONSAM4037– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.17 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4044, в составе:
 - Абатмент ONSAM4044– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.18 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4047, в составе:
 - Абатмент ONSAM4047– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.19 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4054, в составе:
 - Абатмент ONSAM4054– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.20 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4057, в составе:
 - Абатмент ONSAM4057– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.21 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR414, в составе:
 - Абатмент ONSAR414– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.22 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR417, в составе:
 - Абатмент ONSAR417– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.23 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR424, в составе:
 - Абатмент ONSAR424– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.24 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR427, в составе:
 - Абатмент ONSAR427– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.25 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR434, в составе:

- Абатмент ONSAR434– 1 шт.
- Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.26 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR437, в составе:
 - Абатмент ONSAR437– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.27 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR444, в составе:
 - Абатмент ONSAR444– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.28 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR447, в составе:
 - Абатмент ONSAR447– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.29 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR454, в составе:
 - Абатмент ONSAR454– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.30 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR457, в составе:
 - Абатмент ONSAR457– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.31 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR514, в составе:
 - Абатмент ONSAR514– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.32 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR517, в составе:
 - Абатмент ONSAR517– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.33 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR524, в составе:
 - Абатмент ONSAR524– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.34 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR527, в составе:
 - Абатмент ONSAR527– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.35 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR534, в составе:

- Абатмент ONSAR534– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.36 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR537, в составе:
 - Абатмент ONSAR537– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.37 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR544, в составе:
 - Абатмент ONSAR544– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.38 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR547, в составе:
 - Абатмент ONSAR547– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.39 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR554, в составе:
 - Абатмент ONSAR554– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.40 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR557, в составе:
 - Абатмент ONSAR557– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.41 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR614, в составе:
 - Абатмент ONSAR614– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.42 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR617, в составе:
 - Абатмент ONSAR617– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.43 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR624, в составе:
 - Абатмент ONSAR624– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.44 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR627, в составе:
 - Абатмент ONSAR627– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.45 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR634, в составе:

- Абатмент ONSAR634– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.46 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR637, в составе:
 - Абатмент ONSAR637– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.47 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR644, в составе:
 - Абатмент ONSAR644– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.48 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR647, в составе:
 - Абатмент ONSAR647– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.49 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR654, в составе:
 - Абатмент ONSAR654– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.50 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR657, в составе:
 - Абатмент ONSAR657– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 11 Абатмент BLT OS Customized
 - 11.1 Абатмент BLT OS Customized OBCMAM10, в составе:
 - Абатмент OBCMAM10 – 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 11.2 Абатмент BLT OS Customized OBCMAR10, в составе:
 - Абатмент OBCMAR10– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 12 Абатмент BLT OS Multi-Unit
 - 12.1 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM010, в составе:
 - Абатмент OMUAM010– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 12.2 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM020, в составе:
 - Абатмент OMUAM020– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 12.3 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM030, в составе:
 - Абатмент OMUAM030– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.4 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM040, в составе:
 - Абатмент OMUAM040– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.5 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM050, в составе:
 - Абатмент OMUAM050– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.6 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM1725, в составе:
 - Абатмент OMUAM1725– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.7 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM1730, в составе:
 - Абатмент OMUAM1730– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.8 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM1740, в составе:
 - Абатмент OMUAM1740– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.9 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM3035, в составе:
 - Абатмент OMUAM3035– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.10 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM3040, в составе:
 - Абатмент OMUAM3040– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.11 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM3050, в составе:
 - Абатмент OMUAM3050– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.12 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR010, в составе:
 - Абатмент OMUAR010– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт

- Инструкция по применению
- 12.13 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR020, в составе:
 - Абатмент OMUAR020– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.14 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR030, в составе:
 - Абатмент OMUAR030– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.15 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR040, в составе:
 - Абатмент OMUAR040– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.16 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR050, в составе:
 - Абатмент OMUAR050– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.17 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR1725, в составе:
 - Абатмент OMUAR1725– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.18 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR1730, в составе:
 - Абатмент OMUAR1730– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.19 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR1740, в составе:
 - Абатмент OMUAR1740– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.20 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR3035, в составе:
 - Абатмент OMUAR3035– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.21 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR3040, в составе:
 - Абатмент OMUAR3040– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.22 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR3050, в составе:
 - Абатмент OMUAR3050– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт

- Инструкция по применению
- 13 Абатмент Precision Gold UCLA
- 13.1 Абатмент Precision Gold UCLA EIGUB, в составе:
 - Абатмент EIGUB – 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт
- Инструкция по применению
- 13.2 Абатмент Precision Gold UCLA EBGUB, в составе:
 - Абатмент EBGUB – 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт
- Инструкция по применению
- 13.3 Абатмент Precision Gold UCLA EBGUC, в составе:
 - Абатмент EBGUC – 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт
- Инструкция по применению
- 13.4 Абатмент Precision Gold UCLA EIGUC, в составе:
 - Абатмент EIGUC – 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт
- Инструкция по применению
- 14 Абатмент Octa
- 14.1 Абатмент Octa SOA, в составе:
 - Абатмент SOA – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 15. Абатмент Solid
- 15.1 Абатмент Solid SSAR30, в составе:
 - Абатмент SSAR30– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 15.2 Абатмент Solid SSAR40, в составе:
 - Абатмент SSAR40– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40– 1 шт.
- Инструкция по применению
- 15.3 Абатмент Solid SSAR55, в составе:
 - Абатмент SSAR55– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC55– 1 шт.
- Инструкция по применению
- 15.4 Абатмент Solid SSAR70, в составе:
 - Абатмент SSAR70– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70– 1 шт.
- Инструкция по применению
- 16. Абатмент Precision Temporary

16.1 Абатмент Precision Temporary TAO417, в составе:

- Абатмент TAO417– 1 шт.
- Винт SAARS – 1 шт.
- Инструкция по применению

16.2 Абатмент Precision Temporary TAO437, в составе:

- Абатмент TAO437– 1 шт.
- Винт SAARS – 1 шт.
- Инструкция по применению

Далее по тексту – изделие, абатмент, абатмент дентальный, Абатмент временный BLT OS, Абатмент BLT OS BestDuo, Абатмент BLT OS BestAngled, Абатмент BLT OS CCM, Абатмент BLT OS BestOcta, Абатмент съемный BLT OS, Абатмент EpDuo, Абатмент угловой, Абатмент BLT OS BestSolid, Абатмент BLT OS Customized, Абатмент BLT OS Multi-Unit, Абатмент Precision Gold UCLA, Абатмент Octa, Абатмент Solid, Абатмент Temporary

Производитель

Evidence Implant Inc. (Евиденс Имплант Инк.), Республика Корея
32, Innvalley-ro, Dong-gu, Daegu, Republic of Korea

Место производства

Evidence Implant Inc. (Евиденс Имплант Инк.), Республика Корея
32, Innvalley-ro, Dong-gu, Daegu, 41065, Republic of Korea

2. Назначение и применение изделия

Назначение

Изделие предназначено для использования во время хирургического размещения дентального имплантата в качестве опорного протеза для восстановления жевательной функции. (например, моста, одного зуба, съемного протеза, покрывного протеза).

Вид контакта с организмом

Абатменты - Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)

Условия применения

Изделие используется стоматологическими отделениями и отделениями челюстно-лицевой хирургии больниц, клиник, и других лечебно-профилактических учреждений.

Потенциальные потребители медицинского изделия

Изделие используется только стоматологом. Пациент с полной или частичной потерей зубов (взрослые люди с сформировавшейся челюстью)

Область применения

Стоматология

3. Особые свойства изделия

Принцип действия

Абатменты устанавливаются на имплантат и крепятся винтом, для фиксации на имплантате.

Описание изделия

Абатмент – это промежуточное звено между зубным имплантатом и коронкой зуба. Он представляет собой надкостный элемент имплантата, на котором фиксируется конструкция, замещающая утраченные зубы – это может быть единичная коронка, зубной мостовидный протез или съемный протез.

Фото представлены на рисунках ниже



Рисунок 3.1 - Абатмент временный BLT OS



Рисунок 3.2 - Абатмент BLT OS BestDuo



Рисунок 3.3 - Абатмент BLT OS BestAngled

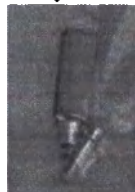


Рисунок 3.4 - Абатмент BLT OS CCM



Рисунок 3.5 - Абатмент Precision CCM UCLA



Рисунок 3.6 - Абатмент BLT OS BestOcta



Рисунок 3.7 - Абатмент съемный BLT OS

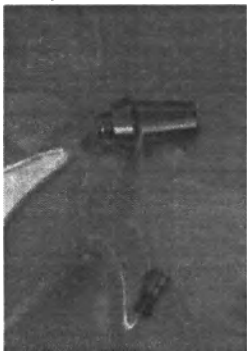


Рисунок 3.8 - Абатмент EpDuo



Рисунок 3.9 - Абатмент угловой



Рисунок 3.10 - Абатмент BLT OS BestSolid



Рисунок 3.11 - Абатмент BLT OS Customized



Рисунок 3.12 - Абатмент BLT OS Multi-Unit

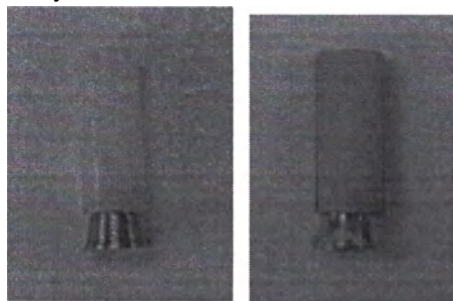


Рисунок 3.13 - Абатмент Precision Gold UCLA



Рисунок 3.14 - Абатмент Osta



Рисунок 3.15 - Абатмент Solid



Рисунок 3.16 - Абатмент Precision Temporary

Конструкция изделия

Конструкция абатмента представлена на рисунке 3.22

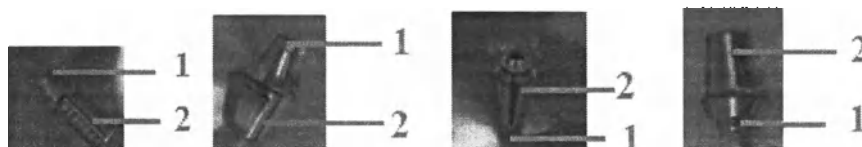


Рисунок 3.22 – Конструкция абатмента

1 – посадочное место

2 – тело имплантата

Конструкция винта представлена на рисунке 3.23

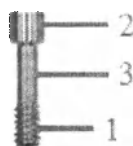


Рисунок 3.23 – Конструкция винта

1 – головка

2 – резьба

3 – цилиндрический стержень

4. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты

Показания:

Абатмент устанавливается для поддержки протеза, такого как искусственный зуб, чтобы пациент мог восстановить жевательную функцию.

Противопоказания:

б. Временные противопоказания

- (1) Острые воспалительные заболевания и инфекции
- (2) Беременность
- (3) Временное использование определенного лекарства
- (4) Физическое напряжение и стресс

в. Психические противопоказания

- (1) Пациент отказывающийся сотрудничать
- (2) Злоупотребление алкоголем и наркотиками
- (3) Пациент является невротиком или страдает от психических расстройств
- (4) Проблемный пациент
- (5) Никотиновая зависимость

г. Общие медицинские противопоказания

- (1) Общее состояние и питание (возраст, ожирение, кахексия)
- (2) Нарушение обмена веществ (ювенильный диабет, уровень сахара в крови более 300 мг/дл)
- (3) Гематологические нарушения (эритроциты, лейкоциты, нарушение свертывающей системы крови)
- (4) Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания (артериосклероз, артериальная гипертензия более 300 мм.рт.ст.)
- (5) Нарушение обмена веществ в головном мозге (остеомаляция, деформирующий остит, несовершенный остеогенез, менопаузальный остеопороз)
- (6) Нарушения коллагеновых структур (склеродермия, ревматоидный артрит)
- (7) Непригодность зубной полости к лечению
- (8) Недостаток костной ткани
- (9) Функциональные проблемы с прикусом
- (10) Альвеолярные заболевания кости
- (11) Пациенты, проходящие лучевую терапию челюстной кости;
- (12) Ксеростомия;
- (13) Болезни слизистой оболочки (витилиго, лишайник, стоматит);
- (14) Акромегалия;
- (15) Аллергия или гиперчувствительность к следующим используемым материалам: CP Титан G4.

Побочные эффекты

- Нарушение жевательной функции пациента;
- Неприживление имплантата и/или необходимость удаления имплантата
- Аллергические реакции и сверхчувствительность;
- Разные типы сплавов в ротовой полости могут привести к гальваническим реакциям в случае окклюзального или проксимального контактов.

5. Предупреждения и меры предосторожности

Предупреждения

- (1) Стоматологические операции должны выполняться только стоматологами и хирургами, имеющими подготовку и опыт в челюстно-лицевой хирургии, а также диагностике и предоперационном планировании.

(2) Неправильный выбор пациента и операции может вызвать неудачу имплантации и потерю альвеолярной кости.

(3) Это одноразовое изделие, и его нельзя использовать повторно.

(4) Риски повторного использования одноразового медицинского изделия.

1) Повторное использование не подтверждено и сопряжено с такими рисками, как передача инфекционных заболеваний.

2) Это может привести к обширным неисправностям, включая дефектное соединение, заклинивание абатмента, повреждение и ослабление винта.

3) Повторное использование между пациентами запрещено.

(5) Производитель не несет ответственности за изделие, повторно стерилизованное пользователями.

(6) Загрязненные изделия должны быть утилизированы, так как они вызывают инфекцию.

(7) Производитель не несет ответственности за проблемы с использованием изделий конкурентов или ненадлежащих инструментов.

(8) Это изделие можно использовать в странах, где изделие было одобрено их правительством или соответствующими агентствами. Доступность изделия зависит от страны в зависимости от процесса регистрации.

* Если пользователи используют аналогичные изделия, которые не производятся и не продаются Evidence Implant, могут возникнуть проблемы с совместимостью по качеству и точности.

Меры предосторожности

1) Перед использованием необходимо полностью ознакомиться с методом использования компонентов ортопедических Evidence.

2) Не используйте просроченные изделия.

3) Изделия, загрязненные по ошибке практикующего специалиста, не могут быть использованы.

4) Каждое изделие является одноразовым и его повторное использование запрещено

6. Инструкции по применению

Подготовка перед использованием

а. Врач должен полностью знать порядок хирургической операции и изделие, а также объяснять пациенту необходимость понимания функциональных и эстетических ограничений.

б. Врач должен соблюдать показания, противопоказания, меры предосторожности и предупреждения именно потому, что выбор изделия влияет на срок службы имплантата.

в. Чтобы предотвратить потерю имплантата, врач должен проверить состояние пациента и поставить диагноз перед операцией, а также составить план измерений.

1. Абатмент Solid / BestSolid / EpDuo / BestDuo

1. Выберите абатмент с высотой, подходящей для расстояния между верхней и нижней челюстью.

2. Зафиксируйте абатмент с усилием ≥ 35 Н*см, используя динамометрический ключ и отвертку.
3. Изделие обладает хорошей фиксацией при холодной сварке, так как контактная поверхность с крепежом имплантата имеет коническую структуру.
4. После установки абатмента приступите к снятию слепка для изготовления временного и окончательного протезирования.

5. При необходимости отрегулируйте высоту, используя бор и прочие инструменты.

6. Для защиты абатмента наденьте защитный колпачок до завершения протезирования.

2. Угловой абатмент / Абатмент BLT OS BestAngled

1. После отверждения десны по завершении второй операции выберите абатмент подходящей высоты с учетом ширины десны. Однако используйте угловой абатмент, если направление установки имплантата является неверным или необходимо изменить угол наклона протеза.

2. Зафиксируйте абатмент с усилием ≥ 35 Н*см, используя динамометрический ключ и отвертку.

3. Снятие слепка

4. После установки на имплантат фиксатора проверьте прикус и трансформацию и зафиксируйте цементом.

3. Абатмент BLT OS CCM, Абатмент Precision CCM UCLA, Абатмент BLT OS BestOcta, Абатмент съемный BLT OS, Абатмент BLT OS Customized, Абатмент BLT OS Multi-Unit, Абатменты Precision Gold UCLA, Абатмент Octa

1. Зафиксируйте абатмент с усилием ≥ 35 Н*см, используя динамометрический ключ и октановую отвертку.

2. Абатмент обладает отличной фиксацией при холодной сварке, поскольку контактная поверхность с крепежом имплантата имеет конусную структуру.

3. После установки абатмента приступите к снятию слепка для изготовления временного и окончательного протезирования.

4. Предотвратите смешивание с инородным веществом внутри винта с внутренней резьбой абатмента, установив восьмигранный защитный колпачок до завершения протезирования.

4. Абатмент временный BLT OS / Абатмент Precision Temporary

1. Перед снятием слепка сначала проверьте состояние десны и сделайте снимок.

2. После снятия слепка сделайте гипсовую повязку и соедините аналог модели с временным абатментом.

3. Изготовьте временный протез после удаления абатмента подходящей длины с учетом зазора между челюстями.

4. После промывки изготовленного временного протеза простерилизуйте его, погрузив в жидкие дезинфицирующие средства.

5. Подсоедините его к штативу, используя усилие ≥ 35 Н*см, проверив соответствие штифта на основании рентгенограммы.

7. Техническая спецификация

Материалы изготовления изделия

Материалы, применяемые в изделии, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.-Материалы, применяемые в изделии

Наименование изделия	Материал	Производитель	Контакт с организмом	Цвет
1.1 Абатмент временный BLT OS	Ti-6Al-4V Титановый сплав (CAS № :99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
1.2 Винт абатмента временного BLT OS			Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
2.1 Абатмент BLT OS BestDuo		Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
2.2 Винт абатмента BLT OS BestDuo			Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
3.1 Абатмент BLT OS BestAngled		Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
3.2 Винт абатмента BLT OS BestAngled			Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой	н/п


			оболочкой (десна)	
4.1 Абатмент BLT OS CCM	Кобальт хром вольфрам молибденовый сплав	Carpenter Technology	Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	Красн ый Белый
4.2 Винт абатмента BLT OS CCM	Ti-6Al-4V Титановый сплав (CAS № :99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
5.1 Абатмент Precision CCM UCLA	Кобальт хром вольфрам молибденовый сплав	Carpenter Technology	Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	Красн ый Белый
5.2 Винт абатмента Precision CCM	Ti-6Al-4V Титановый сплав (CAS № :99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
6. Абатмент BLT OS BestOcta		Fort Wayne Metals	Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
7. Абатмент съемный BLT OS			Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
8.1 Абатмент EpDuo		Fort Wayne Metals	Долговременн ый (более 30	н/п

			суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	
8.2 Винт абатмента EpDuo			Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
9.1 Абатмент угловой		Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
9.2 Винт абатмента углового			Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
10.1 Абатмент BLT OS BestSolid		Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
10.2 Защитный колпачок абатмента BLT OS BestSolid			Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
11. Абатмент BLT OS Customized		Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п

12.1 Абатмент BLT OS Multi-Unit		Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	н/п
12.2 Винт абатмента BLT OS Multi-Unit			Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	н/п
13.1 Абатмент Precision Gold UCLA	Золотой сплав (CAS №:127330-90-9)	Korea Gold Exchange Source LM	Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	Красный Белый
13.2 Винт абатмента Precision Gold UCLA	Ti-6Al-4V Титановый сплав (CAS № :99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	н/п
14. Абатмент Octa	Ti-6Al-4V Титановый сплав (CAS № :99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	н/п
15.1 Абатмент Solid	Ti-6Al-4V Титановый сплав (CAS № :99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	н/п
15.2 Защитный колпачок абатмента Solid			Долговременный (более 30 суток) контакт со слезистой оболочкой (десна)	н/п


			оболочкой (десна)	
16.1 Абатмент Precision Temporary	Ti-6Al-4V ELI Alloy (CAS No:99906-66-8)	Fort Wayne Metals	Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п
16.2 Винт абатмента Temporary			Долговременн ый (более 30 суток) контакт со слизистой оболочкой (десна)	н/п

Массогабаритные характеристики приведены ниже.

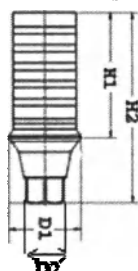

ОТАМ/ОТАР


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент временный BLT OS						
1	ОТАМ4017	7.0	10.8	4.0	Hex2.1	0,272
2	ОТАМ4037	7.0	12.8	4.0	Hex2.1	0.3
3	ОТАМ4057	7.0	14.8	4.0	Hex2.1	0.33
4	ОТАМN4017	7.0	10	4.0	Non-Hex	0,266
5	ОТАМN4037	7.0	12	4.0	Non-Hex	0.29
6	ОТАМN4057	7.0	14	4.0	Non-Hex	0.32
7	ОТАР417	7.0	10.8	4.8	Hex2.5	0,26
8	ОТАР437	7.0	12.8	4.8	Hex2.5	0.31
9	ОТАР457	7.0	14.8	4.8	Hex2.5	0.34
10	ОТАРН417	7.0	10.8	4.8	Non-Hex	0,26
11	ОТАРН437	7.0	12.8	4.8	Non-Hex	0.31
12	ОТАРН457	7.0	14.8	4.8	Non-Hex	0.33

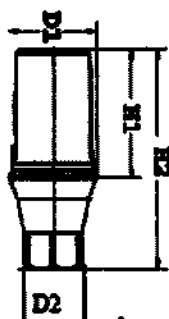

№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS BestDuo						
1	ONOAM3515	5.0	8.8	3.5	2.08	0.122
2	ONOAM3517	7.0	10.8	3.5	2.08	0.13
3	ONOAM3525	5.0	9.8	3.5	2.08	0.14
4	ONOAM3527	7.0	11.8	3.5	2.08	0.15
5	ONOAM3535	5.0	10.8	3.5	2.08	0.16
6	ONOAM3537	7.0	12.8	3.5	2.08	0.18
7	ONOAM3545	5.0	11.8	3.5	2.08	0.19
8	ONOAM3547	7.0	13.8	3.5	2.08	0.20
9	ONOAM3555	5.0	12.8	3.5	2.08	0.21
10	ONOAM3557	7.0	14.8	3.5	2.08	0.22
11	ONOAM4015	5.0	8.8	4.0	2.08	0.136
12	ONOAM4017	7.0	10.8	4.0	2.08	0.14
13	ONOAM4025	5.0	9.8	4.0	2.08	0.15
14	ONOAM4027	7.0	11.8	4.0	2.08	0.16
15	ONOAM4035	5.0	10.8	4.0	2.08	0.17
16	ONOAM4037	7.0	12.8	4.0	2.08	0.18
17	ONOAM4045	5.0	11.8	4.0	2.08	0.19
18	ONOAM4047	7.0	13.8	4.0	2.08	0.20
19	ONOAM4055	5.0	12.8	4.0	2.08	0.21
20	ONOAM4057	7.0	14.8	4.0	2.08	0.22
21	ONOAMN3515	5.0	8	3.5	2.08	0.118
22	ONOAMN3517	7.0	10	3.5	2.08	0.12
23	ONOAMN3525	5.0	9	3.5	2.08	0.13
24	ONOAMN3527	7.0	11	3.5	2.08	0.14
25	ONOAMN3535	5.0	10	3.5	2.08	0.15
26	ONOAMN3537	7.0	12	3.5	2.08	0.16
27	ONOAMN3545	5.0	11	3.5	2.08	0.17
28	ONOAMN3547	7.0	13	3.5	2.08	0.18
29	ONOAMN3555	5.0	12	3.5	2.08	0.19
30	ONOAMN3557	7.0	14	3.5	2.08	0.2
31	ONOAMN4015	5.0	8	4.0	2.08	0.131

32	ONOAMN4017	7.0	10	4.0	2.08	0.14
33	ONOAMN4025	5.0	9	4.0	2.08	0.15
34	ONOAMN4027	7.0	11	4.0	2.08	0.16
35	ONOAMN4035	5.0	10	4.0	2.08	0.17
36	ONOAMN4037	7.0	12	4.0	2.08	0.18
37	ONOAMN4045	5.0	11	4.0	2.08	0.19
38	ONOAMN4047	7.0	13	4.0	2.08	0.2
39	ONOAMN4055	5.0	12	4.0	2.08	0.21
40	ONOAMN4057	7.0	14	4.0	2.08	0.22
41	ONOAR415	5.0	8.8	4.8	2.48	0.201
42	ONOAR417	7.0	10.8	4.8	2.48	0.21
43	ONOAR425	5.0	9.8	4.8	2.48	0.22
44	ONOAR427	7.0	11.8	4.8	2.48	0.23
45	ONOAR435	5.0	10.8	4.8	2.48	0.24
46	ONOAR437	7.0	12.8	4.8	2.48	0.25
47	ONOAR445	5.0	11.8	4.8	2.48	0.26
48	ONOAR447	7.0	13.8	4.8	2.48	0.27
49	ONOAR455	5.0	12.8	4.8	2.48	0.28
50	ONOAR457	7.0	14.8	4.8	2.48	0.29
51	ONOAR515	5.0	8.8	5.5	2.48	0.251
52	ONOAR517	7.0	10.8	5.5	2.48	0.26
53	ONOAR525	5.0	9.8	5.5	2.48	0.27
54	ONOAR527	7.0	11.8	5.5	2.48	0.28
55	ONOAR535	5.0	10.8	5.5	2.48	0.29
56	ONOAR537	7.0	12.8	5.5	2.48	0.31
57	ONOAR545	5.0	11.8	5.5	2.48	0.33
58	ONOAR547	7.0	13.8	5.5	2.48	0.35
59	ONOAR555	5.0	12.8	5.5	2.48	0.36
60	ONOAR557	7.0	14.8	5.5	2.48	0.38
61	ONOAR615	5.0	8.8	6.5	2.48	0.412
62	ONOAR617	7.0	10.8	6.5	2.48	0.42
63	ONOAR625	5.0	9.8	6.5	2.48	0.44
64	ONOAR627	7.0	11.8	6.5	2.48	0.46
65	ONOAR635	5.0	10.8	6.5	2.48	0.48
66	ONOAR637	7.0	12.8	6.5	2.48	0.5
67	ONOAR645	5.0	11.8	6.5	2.48	0.52
68	ONOAR647	7.0	13.8	6.5	2.48	0.54
69	ONOAR655	5.0	12.8	6.5	2.48	0.56
70	ONOAR657	7.0	14.8	6.5	2.48	0.58
71	ONOARN415	5.0	8.8	4.8	2.48	0.202
72	ONOARN417	7.0	10.8	4.8	2.48	0.21
73	ONOARN425	5.0	9.8	4.8	2.48	0.22
74	ONOARN427	7.0	11.8	4.8	2.48	0.23
75	ONOARN435	5.0	10.8	4.8	2.48	0.24
76	ONOARN437	7.0	12.8	4.8	2.48	0.25


77	ONOARN445	5.0	11.8	4.8	2.48	0.26
78	ONOARN447	7.0	13.8	4.8	2.48	0.27
79	ONOARN455	5.0	12.8	4.8	2.48	0.28
80	ONOARN457	7.0	14.8	4.8	2.48	0.29
81	ONOARN515	5.0	8.8	5.5	2.48	0.253
82	ONOARN517	7.0	10.8	5.5	2.48	0.26
83	ONOARN525	5.0	9.8	5.5	2.48	0.27
84	ONOARN527	7.0	11.8	5.5	2.48	0.28
85	ONOARN535	5.0	10.8	5.5	2.48	0.29
86	ONOARN537	7.0	12.8	5.5	2.48	0.31
87	ONOARN545	5.0	11.8	5.5	2.48	0.33
88	ONOARN547	7.0	13.8	5.5	2.48	0.35
89	ONOARN555	5.0	12.8	5.5	2.48	0.36
90	ONOARN557	7.0	14.8	5.5	2.48	0.38
91	ONOARN615	5.0	8.8	6.5	2.48	0.408
92	ONOARN617	7.0	10.8	6.5	2.48	0.42
93	ONOARN625	5.0	9.8	6.5	2.48	0.44
94	ONOARN627	7.0	11.8	6.5	2.48	0.46
95	ONOARN635	5.0	10.8	6.5	2.48	0.48
96	ONOARN637	7.0	12.8	6.5	2.48	0.5
97	ONOARN645	5.0	11.8	6.5	2.48	0.52
98	ONOARN647	7.0	13.8	6.5	2.48	0.54
99	ONOARN655	5.0	12.8	6.5	2.48	0.56
100	ONOARN657	7.0	14.8	6.5	2.48	0.58

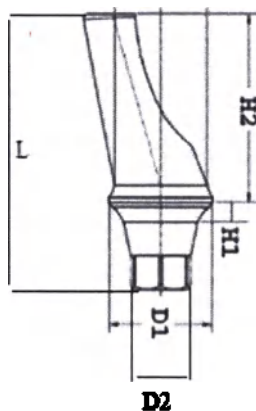


№	Наименование	Параметры						
		Угол, ° ± 0.3°	H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	L, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS BestAngled								
1	OBAAM3511	15	0.8	7.7	3.5	2.08	11.3	0.126
2	OBAAM3512	25	0.8	7.7	3.5	2.08	11.3	0.13
3	OBAAM3521	15	1.8	7.7	3.5	2.08	12.3	0.14
4	OBAAM3522	25	1.8	7.7	3.5	2.08	12.3	0.15

5	OBAAM3531	15	2.8	7.7	3.5	2.08	13.3	0.16
6	OBAAM3532	25	2.8	7.7	3.5	2.08	13.3	0.17
7	OBAAM4011	15	0.8	7.7	4.0	2.08	11.3	0.195
8	OBAAM4012	25	0.8	7.7	4.0	2.08	11.3	0.20
9	OBAAM4021	15	1.8	7.7	4.0	2.08	12.3	0.21
10	OBAAM4022	25	1.8	7.7	4.0	2.08	12.3	0.22
11	OBAAM4031	15	2.8	7.7	4.0	2.08	13.3	0.23
12	OBAAM4032	25	2.8	7.7	4.0	2.08	13.3	0.24
13	OBAAM4041	15	3.8	7.7	4.0	2.08	14.3	0.25
14	OBAAM4042	25	3.8	7.7	4.0	2.08	14.3	0.26
15	OBAAM4051	15	4.8	7.7	4.0	2.08	15.3	0.27
16	OBAAM4052	25	4.8	7.7	4.0	2.08	15.3	0.28
17	OBAAMN3511	15	0.8	7.7	3.5	2.08	10.5	0.117
18	OBAAMN3512	25	0.8	7.7	3.5	2.08	10.5	0.13
19	OBAAMN3521	15	1.8	7.7	3.5	2.08	11.5	0.14
20	OBAAMN3522	25	1.8	7.7	3.5	2.08	11.5	0.15
21	OBAAMN3531	15	2.8	7.7	3.5	2.08	12.5	0.16
22	OBAAMN3532	25	2.8	7.7	3.5	2.08	12.5	0.17
23	OBAAMN4011	15	0.8	7.7	4.0	2.08	10.5	0.186
24	OBAAMN4012	25	0.8	7.7	4.0	2.08	10.5	0.20
25	OBAAMN4021	15	1.8	7.7	4.0	2.08	11.5	0.21
26	OBAAMN4022	25	3.8	7.7	4.0	2.08	11.5	0.22
27	OBAAMN4031	15	2.8	7.7	4.0	2.08	12.5	0.23
28	OBAAMN4032	25	2.8	7.7	4.0	2.08	12.5	0.24
29	OBAAMN4041	15	3.8	7.7	4.0	2.08	13.5	0.25
30	OBAAMN4042	25	3.8	7.7	4.0	2.08	13.5	0.26
31	OBAAMN4051	15	4.8	7.7	4.0	2.08	14.5	0.27
32	OBAAMN4052	25	4.8	7.7	4.0	2.08	14.5	0.28
33	OBAAR411	15	0.8	7.7	4.8	2.48	11.3	0.25
34	OBAAR412	25	0.8	7.7	4.8	2.48	11.3	0.26
35	OBAAR421	15	1.8	7.7	4.8	2.48	12.3	0.27
36	OBAAR422	25	1.8	7.7	4.8	2.48	12.3	0.28
37	OBAAR431	15	2.8	7.7	4.8	2.48	13.3	0.29
38	OBAAR432	25	2.8	7.7	4.8	2.48	13.3	0.3
39	OBAAR441	15	3.8	7.7	4.8	2.48	14.3	0.31
40	OBAAR442	25	3.8	7.7	4.8	2.48	14.3	0.32
41	OBAAR451	15	4.8	7.7	4.8	2.48	15.3	0.33
42	OBAAR452	25	4.8	7.7	4.8	2.48	15.3	0.34
43	OBAARN411	15	0.8	7.7	4.8	2.48	11.3	0.25
44	OBAARN412	25	0.8	7.7	4.8	2.48	11.3	0.26
45	OBAARN421	15	1.8	7.7	4.8	2.48	12.3	0.27
46	OBAARN422	25	1.8	7.7	4.8	2.48	12.3	0.28
47	OBAARN431	15	2.8	7.7	4.8	2.48	13.3	0.29
48	OBAARN432	25	2.8	7.7	4.8	2.48	13.3	0.3
49	OBAARN441	15	3.8	7.7	4.8	2.48	14.3	0.31


50	OBAARN442	25	3.8	7.7	4.8	2.48	14.3	0.32
51	OBAARN451	15	4.8	7.7	4.8	2.48	15.3	0.33
52	OBAARN452	25	4.8	7.7	4.8	2.48	15.3	0.34

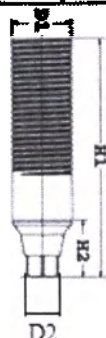


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS CCM						
1	OCUMC40	15.8	3.8	4.0	2.08	0.24
2	OCUMB40	15	3	4.0	2.08	0.23
3	OCURB	15.8	3.8	4.3	2.48	0.391
4	OCURC	15.8	3.8	4.3	2.48	0.396

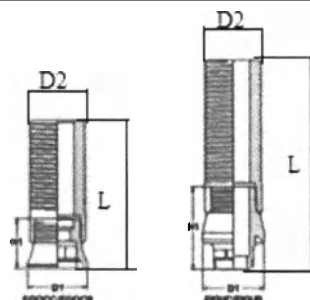

№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	L, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент Precision CCM UCLA						
1	EICUB	6.45	5	4.5	16.45	0.47
2	EICUC	6.45	5	4.5	16.45	0.47

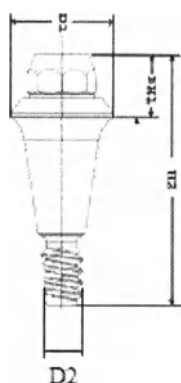


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS BestOcta						
1	OBOA411	2.15	8.65	4.8	2.0	0.198
2	OBOA421	2.15	9.65	4.8	2.0	0.24
3	OBOA431	2.15	10.65	4.8	2.0	0.31
4	OBOA441	2.15	11.65	4.8	2.0	0.36
5	OBOA451	2.15	12.65	4.8	2.0	0.43

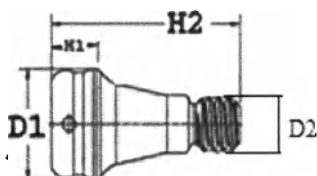

№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ± 10%
Абатмент съемный BLT OS						
1	OLOM401	1.8	7.7	4.0	2.0	0.16
2	OLOM402	1.8	8.7	4.0	2.0	0.20
3	OLOM403	1.8	9.7	4.0	2.0	0.24
4	OLOM404	1.8	10.7	4.0	2.0	0.28
5	OLOM405	1.8	11.7	4.0	2.0	0.31
6	OLOR381	1.8	8.3	3.5	2.0	0.198
7	OLOR382	1.8	9.3	3.5	2.0	0.22
8	OLOR383	1.8	10.3	3.5	2.0	0.26
9	OLOR384	1.8	11.3	3.5	2.0	0.3
10	OLOR385	1.8	12.3	3.5	2.0	0.34
11	OLOR386	1.8	13.3	3.5	2.0	0.38
12	OLOR481	1.8	8.3	4.8	2.0	0.22
13	OLOR482	1.8	9.3	4.8	2.0	0.25
14	OLOR483	1.8	10.3	4.8	2.0	0.29
15	OLOR484	1.8	11.3	4.8	2.0	0.33


16	OLOR485	1.8	12.3	4.8	2.0	0.37
17	OLOR486	1.8	13.3	4.8	2.0	0.41

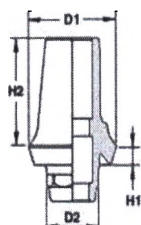


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент EpDuo						
1	NEA505	0.9	5	4.9	3.31	0.192
2	NEA507	0.9	7	4.9	3.31	0.22
3	NEA515	1	5	5.5	3.31	0.28
4	NEA516	1	6	5.5	3.31	0.29
5	NEA517	1	7	5.5	3.31	0.31
6	NEA525	2	5	5.5	3.31	0.32
7	NEA526	2	6	5.5	3.31	0.35
8	NEA527	2	7	5.5	3.31	0.38
9	NEA535	3	5	5.5	3.31	0.41
10	NEA536	3	6	5.5	3.31	0.43
11	NEA537	3	7	5.5	3.31	0.46
12	NEA545	4	5	5.5	3.31	0.48
13	NEA546	4	6	5.5	3.31	0.5
14	NEA547	4	7	5.5	3.31	0.52
15	NEA555	5	5	5.5	3.31	0.55
16	NEA556	5	6	5.5	3.31	0.57
17	NEA557	5	7	5.5	3.31	0.59
18	NEA605	0.85	5	6.5	3.31	0.385
19	NEA607	0.85	7	6.5	3.31	0.46
20	NEA615	1	5	6.5	3.31	0.47
21	NEA616	1	6	6.5	3.31	0.48
22	NEA617	1	7	6.5	3.31	0.49
23	NEA625	2	5	6.5	3.31	0.52
24	NEA626	2	6	6.5	3.31	0.55
25	NEA627	2	7	6.5	3.31	0.58
26	NEA635	3	5	6.5	3.31	0.61
27	NEA636	3	6	6.5	3.31	0.62
28	NEA637	3	7	6.5	3.31	0.63
29	NEA645	4	5	6.5	3.31	0.64
30	NEA646	4	6	6.5	3.31	0.65
31	NEA647	4	7	6.5	3.31	0.66

32	NEA655	5	5	6.5	3.31	0.67
33	NEA656	5	6	6.5	3.31	0.68
34	NEA657	5	7	6.5	3.31	0.69
35	NEA715	1	5	7.5	3.31	0.70
36	NEA716	2	5	7.5	3.31	0.71
37	NEA717	3	5	7.5	3.31	0.72
38	NEA725	1	6	7.5	3.31	0.73
39	NEA726	2	6	7.5	3.31	0.74
40	NEA727	3	6	7.5	3.31	0.75
41	NEA735	3,38	5	7.5	3.31	0.769
42	NEA736	2	7	7.5	3.31	0.78
43	NEA737	3	7	7.5	3.31	0.79
44	NEA745	4	5	7.5	3.31	0.8
45	NEA746	4	6	7.5	3.31	0.81
46	NEA747	4	7	7.5	3.31	0.82
47	NEA755	5	5	7.5	3.31	0.83
48	NEA756	5	6	7.5	3.31	0.84
49	NEA757	5	7	7.5	3.31	0.85
50	NEALK405	0.96	5	4.06	3.31	0.115
51	NEALK505	0.16	5	4.86	3.31	0.13
52	NEALKN405	0.96	5	4.06	3.31	0.115
53	NEALKN505	0.16	5	4.86	3.31	0.13
54	NEAN505	0	5	4.9	3.31	0.192
55	NEAN507	0	7	4.9	3.31	0.22
56	NEAN515	1	5	5.5	3.31	0.28
57	NEAN516	1	6	5.5	3.31	0.29
58	NEAN517	1	7	5.5	3.31	0.31
59	NEAN525	2	5	5.5	3.31	0.32
60	NEAN526	2	6	5.5	3.31	0.35
61	NEAN527	2	7	5.5	3.31	0.38
62	NEAN535	3	5	5.5	3.31	0.41
63	NEAN536	3	6	5.5	3.31	0.43
64	NEAN537	3	7	5.5	3.31	0.46
65	NEAN545	4	5	5.5	3.31	0.48
66	NEAN546	4	6	5.5	3.31	0.5
67	NEAN547	4	7	5.5	3.31	0.52
68	NEAN555	5	5	5.5	3.31	0.55
69	NEAN556	5	6	5.5	3.31	0.57
70	NEAN557	5	7	5.5	3.31	0.59
71	NEAN605	0.96	5	6.5	3.31	0.381
72	NEAN607	0.96	7	6.5	3.31	0.46
73	NEAN615	1	5	6.5	3.31	0.47
74	NEAN616	1	6	6.5	3.31	0.48
75	NEAN617	1	7	6.5	3.31	0.49
76	NEAN625	2	5	6.5	3.31	0.52

77	NEAN626	2	6	6.5	3.31	0.55
78	NEAN627	2	7	6.5	3.31	0.58
79	NEAN635	3	5	6.5	3.31	0.61
80	NEAN636	3	6	6.5	3.31	0.62
81	NEAN637	3	7	6.5	3.31	0.63
82	NEAN645	4	5	6.5	3.31	0.64
83	NEAN646	4	6	6.5	3.31	0.65
84	NEAN647	4	7	6.5	3.31	0.66
85	NEAN655	5	5	6.5	3.31	0.67
86	NEAN656	5	6	6.5	3.31	0.68
87	NEAN657	5	7	6.5	3.31	0.69
88	NEAN715	1,34	5	7.5	3.31	0.497
89	NEAN716	1	6	7.5	3.31	0.5
90	NEAN717	1	7	7.5	3.31	0.51
91	NEAN725	2	5	7.5	3.31	0.52
92	NEAN726	2	6	7.5	3.31	0.53
93	NEAN727	2	7	7.5	3.31	0.54
94	NEAN735	3	5	7.5	3.31	0.55
95	NEAN736	3	6	7.5	3.31	0.56
96	NEAN737	3	7	7.5	3.31	0.57
97	NEAN745	4	5	7.5	3.31	0.58
98	NEAN746	4	6	7.5	3.31	0.59
99	NEAN747	4	7	7.5	3.31	0.6
100	NEAN755	5	5	7.5	3.31	0.61
101	NEAN756	5	6	7.5	3.31	0.62
102	NEAN757	5	7	7.5	3.31	0.63

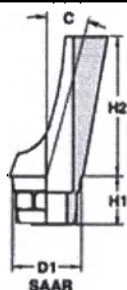


№	Наименование	Параметры				
		Угол, ° ± 0.3°	H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент угловой						
1	SAAR15	15	2.5	7	3.5	0.135
2	SAAR25	25	2.5	7	3.5	0.15
3	SAARN15	15	2.5	7	3.5	0.112
4	SAARN25	25	2.5	7	3.5	0.15

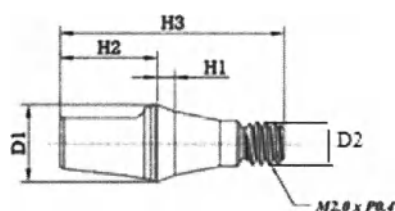


№	Наименование	Параметры					
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	H3, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS BestSolid							
1	ONSAM3514	4.5	10.4	10.4	3.5	M2.0×P0.4	0.229
2	ONSAM3517	7.5	13.4	13.4	3.5	M2.0×P0.4	0.24
3	ONSAM3524	4.5	11.4	11.4	3.5	M2.0×P0.4	0.26
4	ONSAM3527	7.5	14.4	14.4	3.5	M2.0×P0.4	0.27
5	ONSAM3534	4.5	12.4	12.4	3.5	M2.0×P0.4	0.29
6	ONSAM3537	7.5	15.4	15.4	3.5	M2.0×P0.4	0.32
7	ONSAM3544	4.5	13.4	13.4	3.5	M2.0×P0.4	0.34
8	ONSAM3547	7.5	16.4	16.4	3.5	M2.0×P0.4	0.36
9	ONSAM3554	4.5	14.4	14.4	3.5	M2.0×P0.4	0.38
10	ONSAM3557	7.5	17.4	17.4	3.5	M2.0×P0.4	0.41
11	ONSAM4014	4.5	10.4	10.4	4.0	M2.0×P0.4	0.257
12	ONSAM4017	7.5	13.4	13.4	4.0	M2.0×P0.4	0.27
13	ONSAM4024	4.5	11.4	11.4	4.0	M2.0×P0.4	0.29
14	ONSAM4027	7.5	14.4	14.4	4.0	M2.0×P0.4	0.32
15	ONSAM4034	4.5	12.4	12.4	4.0	M2.0×P0.4	0.34
16	ONSAM4037	7.5	15.4	15.4	4.0	M2.0×P0.4	0.36
17	ONSAM4044	4.5	13.4	13.4	4.0	M2.0×P0.4	0.38
18	ONSAM4047	7.5	16.4	16.4	4.0	M2.0×P0.4	0.40
19	ONSAM4054	4.5	14.4	14.4	4.0	M2.0×P0.4	0.43
20	ONSAM4057	7.5	17.4	17.4	4.0	M2.0×P0.4	0.46
21	ONSAR414	4.5	11	11	4.8	M2.0×P0.4	0.304
22	ONSAR417	7.5	14	14	4.8	M2.0×P0.4	0.33
23	ONSAR424	4.5	12	12	4.8	M2.0×P0.4	0.36
24	ONSAR427	7.5	15	15	4.8	M2.0×P0.4	0.39
25	ONSAR434	4.5	13	13	4.8	M2.0×P0.4	0.42
26	ONSAR437	7.5	16	16	4.8	M2.0×P0.4	0.46
27	ONSAR444	4.5	14	14	4.8	M2.0×P0.4	0.5
28	ONSAR447	7.5	17	17	4.8	M2.0×P0.4	0.54
29	ONSAR454	4.5	15	15	4.8	M2.0×P0.4	0.58
30	ONSAR457	7.5	18	18	4.8	M2.0×P0.4	0.62
31	ONSAR514	4.5	11	10.7	5.5	M2.0×P0.4	0.383
32	ONSAR517	7.5	14	13.7	5.5	M2.0×P0.4	0.44
33	ONSAR524	4.5	12	11.7	5.5	M2.0×P0.4	0.47
34	ONSAR527	7.5	15	14.7	5.5	M2.0×P0.4	0.53

35	ONSAR534	4.5	13	12.7	5.5	M2.0×P0.4	0.55
36	ONSAR537	7.5	16	15.7	5.5	M2.0×P0.4	0.56
37	ONSAR544	4.5	14	13.7	5.5	M2.0×P0.4	0.59
38	ONSAR547	7.5	17	16.7	5.5	M2.0×P0.4	0.61
39	ONSAR554	4.5	15	14.7	5.5	M2.0×P0.4	0.65
40	ONSAR557	7.5	18	17.7	5.5	M2.0×P0.4	0.67
41	ONSAR614	4.5	11	11	5.5	M2.0×P0.4	0.70
42	ONSAR617	7.5	14	14	6.5	M2.0×P0.4	0.71
43	ONSAR624	4.5	12	12	6.5	M2.0×P0.4	0.74
44	ONSAR627	7.5	15	15	6.5	M2.0×P0.4	0.75
45	ONSAR634	4.5	13	13	6.5	M2.0×P0.4	0.78
46	ONSAR637	7.5	16	16	6.5	M2.0×P0.4	0.80
47	ONSAR644	4.5	14	14	6.5	M2.0×P0.4	0.82
48	ONSAR647	7.5	17	17	6.5	M2.0×P0.4	0.85
49	ONSAR654	4.5	15	15	6.5	M2.0×P0.4	0.86
50	ONSAR657	7.5	18	18	6.5	M2.0×P0.4	0.929

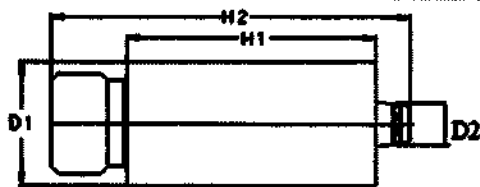


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS Customized						
1	OBCMAM10	20	28.6	9.95	2.08	6,732
2	OBCMAR10	20	28.75	9.95	2.47	6.74

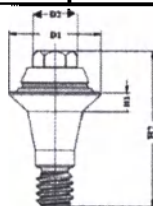


№	Наименование	Параметры					
		Угол, °± 0.3°	H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS Multi-Unit							
1	OMUAM010	0	1.0	8.4	4.8	2.00	0.184
2	OMUAM020	0	2.0	9.4	4.8	2.00	0.23
3	OMUAM030	0	3.0	10.4	4.8	2.00	0.28
4	OMUAM040	0	4.0	11.4	4.8	2.00	0.33
5	OMUAM050	0	5.0	12.4	4.8	2.00	0.38
6	OMUAR010	0	1.0	9.0	4.8	2.00	0.234


7	OMUAR020	0	2.0	10.0	4.8	2.00	0.28
8	OMUAR030	0	3.0	11.0	4.8	2.00	0.33
9	OMUAR040	0	4.0	12.0	4.8	2.00	0.38
10	OMUAR050	0	5.0	13.0	4.8	2.00	0.43

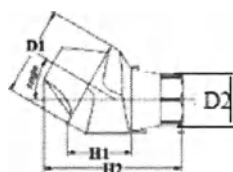


№	Наименование	Параметры					
		Угол, °± 0.3°	H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент BLT OS Multi-Unit							
11	OMUAM1725	17	2.5	7.22	4.8	2.08	0.168
12	OMUAM1730	17	3.0	7.5	4.8	2.08	0.23
13	OMUAM1740	17	4.0	8.5	4.8	2.08	0.3
14	OMUAM3035	30	3.5	7.5	4.8	2.08	0.204
15	OMUAM3040	30	4.0	8.0	4.8	2.08	0.25
16	OMUAM3050	30	5.0	9.0	4.8	2.08	0.26
17	OMUAR1725	17	2.5	7.0	4.8	2.48	0.188
18	OMUAR1730	17	3.0	7.5	4.8	2.48	0.25
19	OMUAR1740	17	4.0	8.5	4.8	2.48	0.32
20	OMUAR3035	30	3.5	7.5	4.8	2.48	0.218
21	OMUAR3040	30	4.0	8.0	4.8	2.48	0.28
22	OMUAR3050	30	5.0	9.0	4.8	2.48	0.35

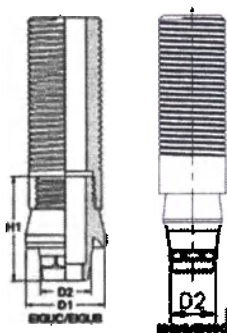


№	Наименование	Параметры			
		H1, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент Precision Gold UCLA					
1	EIGUB	16.45	5	3.1	0.870
2	EBGUB	17.24	5	3.1	0.87
3	EBGUC	17.24	5	3.1	0.872
4	EIGUC	16.45	4.5	3.1	0.86

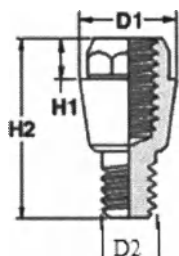


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент Octa						
1	SOA	1.5	6.5	3.5	2.0	0.114

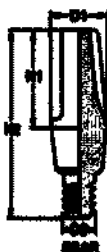


№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент Solid						
1	SSAR30	3	8	3.5	2.0	0.205
2	SSAR40	4	9	3.5	2.0	0.22
3	SSAR55	5.5	10.5	3.5	2.0	0.25
4	SSAR70	7	12	3.5	2.0	0.27

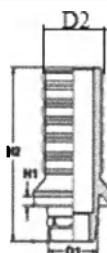

№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Абатмент Precision Temporary						
1	TAO417	1	9	4.8	4	0.271
2	TAO437	3	7	4.8	4	0.31

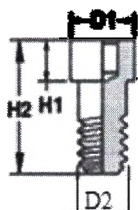

№	Наименование	Параметры				
		H1, мм ±10%	H2, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	Масса, г ±10%
Винты						
1	ONOASM	2.0	9.5	2.25	1.6	0.08
2	ONOASR	2.0	8.5	2.25	2.0	0.10
3	NOASL	1.5	5.2	2.45	2.0	0.06
4	SAARS	1.7	5.7	2.5	2.0	0.069
5	OMUASM	1.55	9.6	2	1.6	0.05
6	OMUASR	1.55	7.5	1.94	2.0	0.05

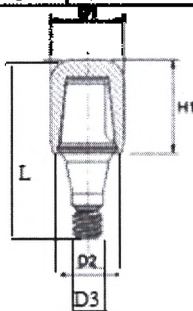

№	Наименование	Параметры					
		H1, мм ±10%	D1, мм ±10%	D2, мм ±10%	D3, мм ±10%	L, мм ±10%	Масса, г ±10%
Защитный колпачок							
1	PSC40	6.1	5.7	5.2	2.0	8.99	0.14
2	PSC55	7.6	5.7	5.2	2.0	13.5	0.15
3	PSC70	9.1	5.7	5.2	2.0	16	0.3
4	PSCM354	6.2	4.8	4.3	2.0	13.1	0.1
5	PSCM357	9.0	4.8	4.3	2.0	16.9	0.14
6	PSCM404	6.2	5.0	4.6	2.0	12.09	0.093
7	PSCM407	9.0	5.0	4.6	2.0	17.9	0.2
8	PEC52	5.7	6.2	5.65	2.0	12.38	0.13
9	PEC55	7.2	6.2	5.5	2.0	18.6	0.20
10	PEC64	6.4	7.2	6.36	2.0	16.3	0.25
11	PEC67	8.7	7.2	6.55	2.0	19.17	0.27

Момент затяжки абатментов $\geq 35 \text{ Н*см}$

Совместимость абатментов

Таблица 7.1. – Совместимость изделий

Абатмент временный BLT OS	Аналог BLT OS
Абатмент BLT OS BestDuo	Имплантат BLT II OS
Абатмент BLT OS BestAngled	РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD
Абатмент BLT OS CCM	РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями
Абатмент BLT OS BestOcta	РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат-литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент Precision CCM UCLA	Аналог имплантата
Абатмент EpDuo	Аналог BLT Octa
Абатмент угловой	Имплантат Precision II
	РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD
	РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями
	РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат-литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент BLT OS BestSolid	Аналог Shoulder
	РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD
	РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями

			РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат- литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент Customized	BLT	OS	Аналог BLT OS Имплантат BLT II OS РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат- литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент BLT OS Multi-Unit			Аналог BLT OS Аналог EpSolid Трансфер слепочный для закрытой ложки BLT OS Колпачок слепочный для открытой ложки BLT OS РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат- литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент Precision Gold UCLA			Аналог имплантата Аналог BLT Octa
Абатмент Temporary	Precision		Имплантат Precision II РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций

	методом фрезерования IPS e.max ZirCAD РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат-литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент Octa	Аналог Octa РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат-литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro
Абатмент Solid	Аналог Solid Аналог BestSolid Аналог Shoulder Имплантат Precision II РЗН 2022/17927 Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом фрезерования IPS e.max ZirCAD РЗН 2024/22041 Заготовки из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, для стоматологических реставраций по технологии CAD/CAM с принадлежностями РЗН 2023/21048 Заготовки стеклокерамические дисиликат-литиевые для стоматологической реставрации Mazic Claro

Расшифровка обозначений на маркировках

	Диаметр (D) (мм)	Высота десны (мм)	Длина от уступа до головки винта (H) (мм)
Абатмент BLT OS Temporary			
OTAM4017	4	1	7
OTAM4037	4	3	7
OTAM4057	4	5	7
OTAMN4017	4	1	7
OTAMN4037	4	3	7
OTAMN4057	4	5	7
OTAR417	4.8	1	7
OTAR437	4.8	3	7
OTAR457	4.8	5	7
OTARN417	4.8	1	7
OTARN437	4.8	3	7
OTARN457	4.8	5	7
Абатмент BLT OS BestDuo			
ONOAM3515	3.5	1	5
ONOAM3517	3.5	1	7
ONOAM3525	3.5	2	5
ONOAM3527	3.5	2	7
ONOAM3535	3.5	3	5
ONOAM3537	3.5	3	7
ONOAM3545	3.5	4	5
ONOAM3547	3.5	4	7
ONOAM3555	3.5	5	5
ONOAM3557	3.5	5	7
ONOAM4015	4	1	5
ONOAM4017	4	1	7
ONOAM4025	4	2	5
ONOAM4027	4	2	7
ONOAM4035	4	3	5
ONOAM4037	4	3	7
ONOAM4045	4	4	5
ONOAM4047	4	4	7
ONOAM4055	4	5	5
ONOAM4057	4	5	7
ONOAMN3515	3.5	1	5
ONOAMN3517	3.5	1	7
ONOAMN3525	3.5	2	5
ONOAMN3527	3.5	2	7
ONOAMN3535	3.5	3	5
ONOAMN3537	3.5	3	7
ONOAMN3545	3.5	4	5

ONOAMN3547	3.5	4	7
ONOAMN3555	3.5	5	5
ONOAMN3557	3.5	5	7
ONOAMN4015	4	1	5
ONOAMN4017	4	1	7
ONOAMN4025	4	2	5
ONOAMN4027	4	2	7
ONOAMN4035	4	3	5
ONOAMN4037	4	3	7
ONOAMN4045	4	4	5
ONOAMN4047	4	4	7
ONOAMN4055	4	5	5
ONOAMN4057	4	5	7
ONOAR415	4.8	1	5
ONOAR417	4.8	1	7
ONOAR425	4.8	2	5
ONOAR427	4.8	2	7
ONOAR435	4.8	3	5
ONOAR437	4.8	3	7
ONOAR445	4.8	4	5
ONOAR447	4.8	4	7
ONOAR455	4.8	5	5
ONOAR457	4.8	5	7
ONOAR515	5.5	1	5
ONOAR517	5.5	1	7
ONOAR525	5.5	2	5
ONOAR527	5.5	2	7
ONOAR535	5.5	3	5
ONOAR537	5.5	3	7
ONOAR545	5.5	4	5
ONOAR547	5.5	4	7
ONOAR555	5.5	5	5
ONOAR557	5.5	5	7
ONOAR615	6.5	1	5
ONOAR617	6.5	1	7
ONOAR625	6.5	2	5
ONOAR627	6.5	2	7
ONOAR635	6.5	3	5
ONOAR637	6.5	3	7
ONOAR645	6.5	4	5
ONOAR647	6.5	4	7
ONOAR655	6.5	5	5
ONOAR657	6.5	5	7
ONOARN415	4.8	1	5
ONOARN417	4.8	1	7

ONOARN425	4.8	2	5
ONOARN427	4.8	2	7
ONOARN435	4.8	3	5
ONOARN437	4.8	3	7
ONOARN445	4.8	4	5
ONOARN447	4.8	4	7
ONOARN455	4.8	5	5
ONOARN457	4.8	5	7
ONOARN515	5.5	1	5
ONOARN517	5.5	1	7
ONOARN525	5.5	2	5
ONOARN527	5.5	2	7
ONOARN535	5.5	3	5
ONOARN537	5.5	3	7
ONOARN545	5.5	4	5
ONOARN547	5.5	4	7
ONOARN555	5.5	5	5
ONOARN557	5.5	5	7
ONOARN615	6.5	1	5
ONOARN617	6.5	1	7
ONOARN625	6.5	2	5
ONOARN627	6.5	2	7
ONOARN635	6.5	3	5
ONOARN637	6.5	3	7
ONOARN645	6.5	4	5
ONOARN647	6.5	4	7
ONOARN655	6.5	5	5
ONOARN657	6.5	5	7
Абтмент BLT OS BestAngled			
OBAAM3511	3.5	1	1
OBAAM3512	3.5	1	2
OBAAM3521	3.5	2	1
OBAAM3522	3.5	2	2
OBAAM3531	3.5	3	1
OBAAM3532	3.5	3	2
OBAAM4011	4	1	1
OBAAM4012	4	1	2
OBAAM4021	4	2	1
OBAAM4022	4	2	2
OBAAM4031	4	3	1
OBAAM4032	4	3	2
OBAAM4041	4	4	1
OBAAM4042	4	4	2
OBAAM4051	4	5	1
OBAAM4052	4	5	2

OBAAMN3511	4.8	1	1
OBAAMN3512	4.8	1	2
OBAAMN3521	4.8	2	1
OBAAMN3522	4.8	2	2
OBAAMN3531	4.8	3	1
OBAAMN3532	4.8	3	2
OBAAMN4011	4.8	1	1
OBAAMN4012	4.8	1	2
OBAAMN4021	4.8	2	1
OBAAMN4022	4.8	2	2
OBAAMN4031	3.5	3	1
OBAAMN4032	3.5	3	2
OBAAMN4041	3.5	4	1
OBAAMN4042	3.5	4	2
OBAAMN4051	3.5	5	1
OBAAMN4052	3.5	5	2
OBAAR411	4	1	1
OBAAR412	4	1	2
OBAAR421	4	2	1
OBAAR422	4	2	2
OBAAR431	4	3	1
OBAAR432	4	3	2
OBAAR441	4	4	1
OBAAR442	4	4	2
OBAAR451	4	5	1
OBAAR452	4	5	2
OBAARN411	4.8	1	1
OBAARN412	4.8	1	2
OBAARN421	4.8	2	1
OBAARN422	4.8	2	2
OBAARN431	4.8	3	1
OBAARN432	4.8	3	2
OBAARN441	4.8	4	1
OBAARN442	4.8	4	2
OBAARN451	4.8	5	1
OBAARN452	4.8	5	2
Абатмент BLT OS CCM			
OCUMC40	4	3.8	15.8
OCUMB40	4	3	15
OCURB	4.3	3.8	15.8
OCURC	4.3	3.8	15.8
Абатмент Precision CCM UCLA			
EICUB	5		6.45
EICUC	5		6.45
Абатмент BLT OS BestOcta			

OBOA411	4.8	1	1
OBOA421	4.8	2	1
OBOA431	4.8	3	1
OBOA441	4.8	4	1
OBOA451	4.8	5	1
Абатмент BLT OS Denture			
OLOM401	4	1	1.8
OLOM402	4	2	1.8
OLOM403	4	3	1.8
OLOM404	4	4	1.8
OLOM405	4	5	1.8
OLOR381	3.8	1	1.8
OLOR382	3.8	2	1.8
OLOR383	3.8	3	1.8
OLOR384	3.8	4	1.8
OLOR385	3.8	5	1.8
OLOR386	3.8	6	1.8
OLOR481	4.8	1	1.8
OLOR482	4.8	2	1.8
OLOR483	4.8	3	1.8
OLOR484	4.8	4	1.8
OLOR485	4.8	5	1.8
OLOR486	4.8	6	1.8
Абатмент EpDuo			
NEA505	5.5	0	5
NEA507	5.5	0	7
NEA515	5.5	1	5
NEA516	5.5	1	6
NEA517	5.5	1	7
NEA525	5.5	2	5
NEA526	5.5	2	6
NEA527	5.5	2	7
NEA535	5.5	3	5
NEA536	5.5	3	6
NEA537	5.5	3	7
NEA545	5.5	4	5
NEA546	5.5	4	6
NEA547	5.5	4	7
NEA555	5.5	5	5
NEA556	5.5	5	6
NEA557	5.5	5	7
NEA605	6.5	0	5
NEA607	6.5	0	7
NEA615	6.5	1	5
NEA616	6.5	1	6

NEA617	6.5	1	7
NEA625	6.5	2	5
NEA626	6.5	2	6
NEA627	6.5	2	7
NEA635	6.5	3	5
NEA636	6.5	3	6
NEA637	6.5	3	7
NEA645	6.5	4	5
NEA646	6.5	4	6
NEA647	6.5	4	7
NEA655	6.5	5	5
NEA656	6.5	5	6
NEA657	6.5	5	7
NEA715	7.5	1	5
NEA716	7.5	1	6
NEA717	7.5	1	7
NEA725	7.5	2	5
NEA726	7.5	2	6
NEA727	7.5	2	7
NEA735	7.5	3	5
NEA736	7.5	3	6
NEA737	7.5	3	7
NEA745	7.5	4	5
NEA746	7.5	4	6
NEA747	7.5	4	7
NEA755	7.5	5	5
NEA756	7.5	5	6
NEA757	7.5	5	7
NEALK405	4.06	5	5.6
NEALK505	4.86	5	1.6
NEALKN405	4.06	5	5.6
NEALKN505	4.86	5	1.6
NEAN505	5.5	0	5
NEAN507	5.5	0	7
NEAN515	5.5	1	5
NEAN516	5.5	1	6
NEAN517	5.5	1	7
NEAN525	5.5	2	5
NEAN526	5.5	2	6
NEAN527	5.5	2	7
NEAN535	5.5	3	5
NEAN536	5.5	3	6
NEAN537	5.5	3	7
NEAN545	5.5	4	5
NEAN546	5.5	4	6

NEAN547	5.5	4	7
NEAN555	5.5	5	5
NEAN556	5.5	5	6
NEAN557	5.5	5	7
NEAN605	6.5	0	5
NEAN607	6.5	0	7
NEAN615	6.5	1	5
NEAN616	6.5	1	6
NEAN617	6.5	1	7
NEAN625	6.5	2	5
NEAN626	6.5	2	6
NEAN627	6.5	2	7
NEAN635	6.5	3	5
NEAN636	6.5	3	6
NEAN637	6.5	3	7
NEAN645	6.5	4	5
NEAN646	6.5	4	6
NEAN647	6.5	4	7
NEAN655	6.5	5	5
NEAN656	6.5	5	6
NEAN657	6.5	5	7
NEAN715	7.5	1	5
NEAN716	7.5	1	6
NEAN717	7.5	1	7
NEAN725	7.5	2	5
NEAN726	7.5	2	6
NEAN727	7.5	2	7
NEAN735	7.5	3	5
NEAN736	7.5	3	6
NEAN737	7.5	3	7
NEAN745	7.5	4	5
NEAN746	7.5	4	6
NEAN747	7.5	4	7
NEAN755	7.5	5	5
NEAN756	7.5	5	6
NEAN757	7.5	5	7
Абатмент Angled			
SAAR15	3.5	2.5	7
SAAR25	3.5	2.5	7
SAARN15	3.5	2.5	7
SAARN25	3.5	2.5	7
Абатмент BLT OS BestSolid			
ONSAM3514	3.5	1	4.5
ONSAM3517	3.5	1	7.5
ONSAM3524	3.5	2	4.5

ONSAM3527	3.5	2	7.5
ONSAM3534	3.5	3	4.5
ONSAM3537	3.5	3	7.5
ONSAM3544	3.5	4	4.5
ONSAM3547	3.5	4	7.5
ONSAM3554	3.5	5	4.5
ONSAM3557	3.5	5	7.5
ONSAM4014	4.0	1	4.5
ONSAM4017	4.0	1	7.5
ONSAM4024	4.0	2	4.5
ONSAM4027	4.0	2	7.5
ONSAM4034	4.0	3	4.5
ONSAM4037	4.0	3	7.5
ONSAM4044	4.0	4	4.5
ONSAM4047	4.0	4	7.5
ONSAM4054	4.0	5	4.5
ONSAM4057	4.0	5	7.5
ONSAR414	4.8	1	4.5
ONSAR417	4.8	1	7.5
ONSAR424	4.8	2	4.5
ONSAR427	4.8	2	7.5
ONSAR434	4.8	3	4.5
ONSAR437	4.8	3	7.5
ONSAR444	4.8	4	4.5
ONSAR447	4.8	4	7.5
ONSAR454	4.8	5	4.5
ONSAR457	4.8	5	7.5
ONSAR514	5.5	1	4.5
ONSAR517	5.5	1	7.5
ONSAR524	5.5	2	4.5
ONSAR527	5.5	2	7.5
ONSAR534	5.5	3	4.5
ONSAR537	5.5	3	7.5
ONSAR544	5.5	4	4.5
ONSAR547	5.5	4	7.5
ONSAR554	5.5	5	4.5
ONSAR557	5.5	5	7.5
ONSAR614	6.5	1	4.5
ONSAR617	6.5	1	7.5
ONSAR624	6.5	2	4.5
ONSAR627	6.5	2	7.5
ONSAR634	6.5	3	4.5
ONSAR637	6.5	3	7.5
ONSAR644	6.5	4	4.5
ONSAR647	6.5	4	7.5

ONSAR654	6.5	5	4.5
ONSAR657	6.5	5	7.5
Абатмент BLT OS Customized			
OBCMAM10	9.95	-	26
OBCMAR10	9.95	-	26
Абатмент BLT OS Multi-Unit			
OMUAM010	4.8	1.0	3.25
OMUAM020	4.8	2.0	4.25
OMUAM030	4.8	3.0	5.25
OMUAM040	4.8	4.0	6.25
OMUAM050	4.8	5.0	7.25
OMUAM1725	4.8	2.5	4.15
OMUAM1730	4.8	3.0	4.65
OMUAM1740	4.8	4.0	5.65
OMUAM3035	4.8	3.5	4.63
OMUAM3040	4.8	4.0	5.13
OMUAM3050	4.8	5.0	6.13
OMUAR010	4.8	1.0	3.25
OMUAR020	4.8	2.0	4.25
OMUAR030	4.8	3.0	5.25
OMUAR040	4.8	4.0	6.25
OMUAR050	4.8	5.0	7.25
OMUAR1725	4.8	2.5	4.15
OMUAR1730	4.8	3.0	4.65
OMUAR1740	4.8	4.0	5.65
OMUAR3035	4.8	3.5	4.63
OMUAR3040	4.8	4.0	5.13
OMUAR3050	4.8	5.0	6.13
Абатмент Precision Gold UCLA			
EIGUB	5		6.45
EBGUB	5		6.45
EBGUC	5		6.45
EIGUC	5		6.45
Абатмент Octa			
SOA	3.5		4
Абатмент Solid			
SSAR30	3.5		3
SSAR40	3.5		4
SSAR55	3.5		5.5
SSAR70	3.5		7
Абатмент Precision Temporary			
TAO417	4.8		7
TAO437	4.8		7

Комплект поставки изделия

Абатменты для дентальных имплантатов, в вариантах исполнения

1 Абатмент временный BLT OS

1.1 Абатмент временный BLT OS OTAM4017, в составе:

- Абатмент OTAM4017– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.2 Абатмент временный BLT OS OTAM4037, в составе:

- Абатмент OTAM4037– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.3 Абатмент временный BLT OS OTAM4057, в составе:

- Абатмент OTAM4057– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.4 Абатмент временный BLT OS OTAMN4017, в составе:

- Абатмент OTAMN4017– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.5 Абатмент временный BLT OS OTAMN4037, в составе:

- Абатмент OTAMN4037– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.6 Абатмент временный BLT OS OTAMN4057, в составе:

- Абатмент OTAMN4057– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению

1.7 Абатмент временный BLT OS OTAR417, в составе:

- Абатмент OTAR417– 1 шт.

- Винт ONOASR– 1 шт.

- Инструкция по применению

1.8 Абатмент временный BLT OS OTAR437, в составе:

- Абатмент OTAR437– 1 шт.

- Винт ONOASR– 1 шт.

- Инструкция по применению

1.9 Абатмент временный BLT OS OTAR457, в составе:

- Абатмент OTAR457– 1 шт.

- Винт ONOASR– 1 шт.

- Инструкция по применению

1.10 Абатмент временный BLT OS OTARN417, в составе:

- Абатмент OTARN417– 1 шт.
- Винт ONOASR– 1 шт.
- Инструкция по применению

1.11 Абатмент временный BLT OS OTARN437, в составе:

- Абатмент OTARN437– 1 шт.
- Винт ONOASR– 1 шт.
- Инструкция по применению

1.12 Абатмент временный BLT OS OTARN457, в составе:

- Абатмент OTARN457– 1 шт.
- Винт ONOASR– 1 шт.
- Инструкция по применению

2 Абатмент BLT OS BestDuo

2.1 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3515, в составе:

- Абатмент ONOAM3515– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.2 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3517, в составе:

- Абатмент ONOAM3517– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.3 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3525, в составе:

- Абатмент ONOAM3525– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.4 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3527, в составе:

- Абатмент ONOAM3527– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.5 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3535, в составе:

- Абатмент ONOAM3535– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.6 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3537, в составе:

- Абатмент ONOAM3537– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению

2.7 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3545, в составе:

- Абатмент ONOAM3545– 1 шт.
- Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.8 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3547, в составе:
 - Абатмент ONOAM3547– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.9 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3555, в составе:
 - Абатмент ONOAM3555– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.10 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3557, в составе:
 - Абатмент ONOAM3557– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.11 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4015, в составе:
 - Абатмент ONOAM4015– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.12 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4017, в составе:
 - Абатмент ONOAM4017– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.13 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4025, в составе:
 - Абатмент ONOAM4025– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.14 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4027, в составе:
 - Абатмент ONOAM4027– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.15 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4035, в составе:
 - Абатмент ONOAM4035– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.16 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4037, в составе:
 - Абатмент ONOAM4037– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.17 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4045, в составе:
 - Абатмент ONOAM4045– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.18 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4047, в составе:
 - Абатмент ONOAM4047– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.19 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4055, в составе:
 - Абатмент ONOAM4055– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.20 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM4057, в составе:
 - Абатмент ONOAM4057– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.21 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3515, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3515– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.22 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAM3517, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3517– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.23 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3525, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3525– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.24 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3527, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3527– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.25 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3535, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3535– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.26 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3537, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3537– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.27 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3545, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3545– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.28 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3547, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3547– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.29 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3555, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3555– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.30 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN3557, в составе:
 - Абатмент ONOAMN3557– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.31 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4015, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4015– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.32 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4017, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4017– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.33 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4025, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4025– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.34 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4027, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4027– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.35 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4035, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4035– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.36 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4037, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4037– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.37 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4045, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4045– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.38 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4047, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4047– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.39 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4055, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4055– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.40 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAMN4057, в составе:
 - Абатмент ONOAMN4057– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.41 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR415, в составе:
 - Абатмент ONOAR 415– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.42 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR417, в составе:
 - Абатмент ONOAR 417– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.43 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR425, в составе:
 - Абатмент ONOAR 425– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.44 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR427, в составе:
 - Абатмент ONOAR 427– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.45 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR435, в составе:
 - Абатмент ONOAR 435– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.46 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR437, в составе:
 - Абатмент ONOAR 437– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.47 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR445, в составе:
 - Абатмент ONOAR 445– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.48 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR447, в составе:
 - Абатмент ONOAR 447– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.49 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR455, в составе:
 - Абатмент ONOAR 455– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.50 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR457, в составе:
 - Абатмент ONOAR 457– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.51 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR515, в составе:
 - Абатмент ONOAR 515– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.52 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR517, в составе:
 - Абатмент ONOAR 517– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.53 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR525, в составе:
 - Абатмент ONOAR 525– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.54 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR527, в составе:
 - Абатмент ONOAR 527– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.55 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR535, в составе:
 - Абатмент ONOAR 535– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.56 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR537, в составе:
 - Абатмент ONOAR 537– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 2.57 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR545, в составе:
 - Абатмент ONOAR 545– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.58 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR547, в составе:
 - Абатмент ONOAR 547– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.59 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR555, в составе:
 - Абатмент ONOAR 555– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.60 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR557, в составе:
 - Абатмент ONOAR 557– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.61 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR615, в составе:
 - Абатмент ONOAR 615– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.62 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR617, в составе:
 - Абатмент ONOAR617– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.63 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR625, в составе:
 - Абатмент ONOAR625– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.64 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR627, в составе:
 - Абатмент ONOAR627– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.65 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR635, в составе:
 - Абатмент ONOAR635– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.66 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR637, в составе:
 - Абатмент ONOAR637– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.67 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR645, в составе:
 - Абатмент ONOAR645– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.68 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR647, в составе:
 - Абатмент ONOAR647– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.69 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR655, в составе:
 - Абатмент ONOAR655– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.70 Абатмент BLT OS BestDuo ONOAR657, в составе:
 - Абатмент ONOAR657– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.71 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN415, в составе:
 - Абатмент ONOARN415– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.72 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN417, в составе:
 - Абатмент ONOARN417– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.73 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN425, в составе:
 - Абатмент ONOARN425– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.74 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN427, в составе:
 - Абатмент ONOARN427– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.75 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN435, в составе:
 - Абатмент ONOARN435– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.76 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN437, в составе:
 - Абатмент ONOARN437– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.77 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN445, в составе:
 - Абатмент ONOARN445– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.78 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN447, в составе:
 - Абатмент ONOARN447– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.79 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN455, в составе:
 - Абатмент ONOARN455– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.80 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN457, в составе:
 - Абатмент ONOARN457– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.81 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN515, в составе:
 - Абатмент ONOARN515– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.82 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN517, в составе:
 - Абатмент ONOARN517– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.83 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN525, в составе:
 - Абатмент ONOARN525– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.84 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN527, в составе:
 - Абатмент ONOARN527– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.85 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN535, в составе:
 - Абатмент ONOARN535– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.86 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN537, в составе:
 - Абатмент ONOARN537– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.87 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN545, в составе:
 - Абатмент ONOARN545– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.88 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN547, в составе:
 - Абатмент ONOARN547– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.89 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN555, в составе:
 - Абатмент ONOARN555– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.90 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN557, в составе:
 - Абатмент ONOARN557– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.91 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN615, в составе:
 - Абатмент ONOARN615– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.92 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN617, в составе:
 - Абатмент ONOARN617– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.93 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN625, в составе:
 - Абатмент ONOARN625– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.94 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN627, в составе:
 - Абатмент ONOARN627– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.95 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN635, в составе:
 - Абатмент ONOARN635– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.96 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN637, в составе:
 - Абатмент ONOARN637– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.97 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN645, в составе:
 - Абатмент ONOARN645– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 2.98 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN647, в составе:
 - Абатмент ONOARN647– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.99 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN655, в составе:
 - Абатмент ONOARN655– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 2.100 Абатмент BLT OS BestDuo ONOARN657, в составе:
 - Абатмент ONOARN657– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3 Абатмент BLT OS BestAngled
- 3.1 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3511, в составе:
 - Абатмент OBAAM3511– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.2 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3512, в составе:
 - Абатмент OBAAM3512– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.3 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3521, в составе:
 - Абатмент OBAAM3521– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.4 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3522, в составе:
 - Абатмент OBAAM3522– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.5 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3531, в составе:
 - Абатмент OBAAM3531– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.6 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM3532, в составе:
 - Абатмент OBAAM3532– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.7 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4011, в составе:
 - Абатмент OBAAM4011– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.8 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4012, в составе:
 - Абатмент OBAAM4012– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.9 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4021, в составе:
 - Абатмент OBAAM4021– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.10 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4022, в составе:
 - Абатмент OBAAM4022– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.11 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4031, в составе:
 - Абатмент OBAAM4031– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.12 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4032, в составе:
 - Абатмент OBAAM4032– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.13 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4041, в составе:
 - Абатмент OBAAM4041– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.14 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4042, в составе:
 - Абатмент OBAAM4042– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.15 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4051, в составе:
 - Абатмент OBAAM4051– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.16 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAM4052, в составе:
 - Абатмент OBAAM4052– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.17 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3511, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3511– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.18 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3512, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3512– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.19 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3521, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3521– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.20 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3522, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3522– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.21 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3531, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3531– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.22 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN3532, в составе:
 - Абатмент OBAAMN3532– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.23 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4011, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4011– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.24 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4012, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4012– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.25 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4021, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4021– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.26 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4022, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4022– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.27 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4031, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4031– 1 шт.

- Винт ONOASM – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.28 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4032, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4032– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.29 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4041, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4041– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.30 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4042, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4042– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.31 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4051, в составе:
 - Абатмент OBAAMN4051– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.32 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAMN4052, в составе:
 - Абатмент OBA OBAAMNAM 4052– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.33 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR411, в составе:
 - Абатмент OBAAR411– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.34 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR412, в составе:
 - Абатмент OBAAR412– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.35 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR421, в составе:
 - Абатмент OBAAR421– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.36 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR422, в составе:
 - Абатмент OBAAR422– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.37 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR431, в составе:
 - Абатмент OBAAR431– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.38 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR432, в составе:
 - Абатмент OBAAR432– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.39 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR441, в составе:
 - Абатмент OBAAR441– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.40 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR442, в составе:
 - Абатмент OBAAR442– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.41 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR451, в составе:
 - Абатмент OBAAR451– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.42 Абатмент BLT OS BestAngled OBAAR452, в составе:
 - Абатмент OBAAR452– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.43 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN411, в составе:
 - Абатмент OBAARN411– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.44 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN412, в составе:
 - Абатмент OBAARN412– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.45 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN421, в составе:
 - Абатмент OBAARN421– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.46 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN422, в составе:
 - Абатмент OBAARN422– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.47 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN431, в составе:
 - Абатмент OBAARN431– 1 шт.

- Винт ONOASR – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 3.48 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN432, в составе:
 - Абатмент OBAARN432– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.49 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN441, в составе:
 - Абатмент OBAARN441– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.50 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN442, в составе:
 - Абатмент OBAARN442– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.51 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN451, в составе:
 - Абатмент OBAARN451– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 3.52 Абатмент BLT OS BestAngled OBAARN452, в составе:
 - Абатмент OBAARN452– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4 Абатмент BLT OS CCM
- 4.1 Абатмент BLT OS CCM OCUMC40, в составе:
 - Абатмент OCUMC40– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4.2 Абатмент BLT OS CCM OCUMB40, в составе:
 - Абатмент OCUMB40– 1 шт.
 - Винт ONOASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4.3 Абатмент BLT OS CCM OCURB, в составе:
 - Абатмент OCURB – 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 4.4 Абатмент BLT OS CCM OCURC, в составе:
 - Абатмент OCURC – 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 5 Абатмент Precision CCM UCLA

5.1 Абатмент Precision CCM UCLA EICUB, в составе:

- Абатмент EICUB – 1 шт.
- Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению

5.2 Абатмент Precision CCM UCLA EICUC, в составе:

- Абатмент EICUC – 1 шт.
- Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению

6 Абатмент BLT OS BestOcta

6.1 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA411, в составе:

- Абатмент OBOA411– 1 шт.
- Инструкция по применению

6.2 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA421, в составе:

- Абатмент OBOA421– 1 шт.
- Инструкция по применению

6.3 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA431, в составе:

- Абатмент OBOA431– 1 шт.
- Инструкция по применению

6.4 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA441, в составе:

- Абатмент OBOA441– 1 шт.
- Инструкция по применению

6.5 Абатмент BLT OS BestOcta OBOA451, в составе:

- Абатмент OBOA451– 1 шт.
- Инструкция по применению

7 Абатмент съемный BLT OS

7.1 Абатмент съемный BLT OS OLOM401, в составе:

- Абатмент OLOM401– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.2 Абатмент съемный BLT OS OLOM402, в составе:

- Абатмент OLOM402– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.3 Абатмент съемный BLT OS OLOM403, в составе:

- Абатмент OLOM403– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.4 Абатмент съемный BLT OS OLOM404, в составе:

- Абатмент OLOM404– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.5 Абатмент съемный BLT OS OLOM405, в составе:

- Абатмент OLOM405– 1 шт.
- Инструкция по применению

7.6 Абатмент съемный BLT OS OLOR481, в составе:

- Абатмент OLOR481– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.7 Абатмент съемный BLT OS OLOR482, в составе:

- Абатмент OLOR482– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.8 Абатмент съемный BLT OS OLOR483, в составе:

- Абатмент OLOR483– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.9 Абатмент съемный BLT OS OLOR484, в составе:

- Абатмент OLOR484– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.10 Абатмент съемный BLT OS OLOR485, в составе:

- Абатмент OLOR485– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.11 Абатмент съемный BLT OS OLOR486, в составе:

- Абатмент OLOR486– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.12 Абатмент съемный BLT OS OLOR381, в составе:

- Абатмент OLOR381– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.13 Абатмент съемный BLT OS OLOR382, в составе:

- Абатмент OLOR382– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.14 Абатмент съемный BLT OS OLOR383, в составе:

- Абатмент OLOR383– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.15 Абатмент съемный BLT OS OLOR384, в составе:

- Абатмент OLOR384– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.16 Абатмент съемный BLT OS OLOR385, в составе:

- Абатмент OLOR385– 1 шт.

- Инструкция по применению

7.17 Абатмент съемный BLT OS OLOR386, в составе:

- Абатмент OLOR386– 1 шт.

- Инструкция по применению

8 Абатмент EpDuo

8.1 Абатмент EpDuo NEA505, в составе:

- Абатмент NEA505– 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.2 Абатмент ЕрDuo NEA507, в составе:
 - Абатмент NEA507– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.3 Абатмент ЕрDuo NEA515, в составе:
 - Абатмент NEA515– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.4 Абатмент ЕрDuo NEA516, в составе:
 - Абатмент NEA516– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.5 Абатмент ЕрDuo NEA517, в составе:
 - Абатмент NEA517– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.6 Абатмент ЕрDuo NEA525, в составе:
 - Абатмент NEA525– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.7 Абатмент ЕрDuo NEA526, в составе:
 - Абатмент NEA526– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.8 Абатмент ЕрDuo NEA527, в составе:
 - Абатмент NEA527– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.9 Абатмент ЕрDuo NEA535, в составе:
 - Абатмент NEA535– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.10 Абатмент ЕрDuo NEA536, в составе:
 - Абатмент NEA536– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 8.11 Абатмент ЕрDuo NEA537, в составе:
 - Абатмент NEA537– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.12 Абатмент EpDuo NEA545, в составе:
 - Абатмент NEA545– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.13 Абатмент EpDuo NEA546, в составе:
 - Абатмент NEA546– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.14 Абатмент EpDuo NEA547, в составе:
 - Абатмент NEA547– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.15 Абатмент EpDuo NEA555, в составе:
 - Абатмент NEA555– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.16 Абатмент EpDuo NEA556, в составе:
 - Абатмент NEA556– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.17 Абатмент EpDuo NEA557, в составе:
 - Абатмент NEA557– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.18 Абатмент EpDuo NEA605, в составе:
 - Абатмент NEA605– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.19 Абатмент EpDuo NEA607, в составе:
 - Абатмент NEA607– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.20 Абатмент EpDuo NEA615, в составе:
 - Абатмент NEA615– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.21 Абатмент EpDuo NEA616, в составе:
 - Абатмент NEA616– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.22 Абатмент ЕрДуо NEA617, в составе:
 - Абатмент NEA617– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.23 Абатмент ЕрДуо NEA625, в составе:
 - Абатмент NEA625– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.24 Абатмент ЕрДуо NEA626, в составе:
 - Абатмент NEA626– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.25 Абатмент ЕрДуо NEA627, в составе:
 - Абатмент NEA627– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.26 Абатмент ЕрДуо NEA635, в составе:
 - Абатмент NEA635– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.27 Абатмент ЕрДуо NEA636, в составе:
 - Абатмент NEA636– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.28 Абатмент ЕрДуо NEA637, в составе:
 - Абатмент NEA637– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.29 Абатмент ЕрДуо NEA645, в составе:
 - Абатмент NEA645– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.30 Абатмент ЕрДуо NEA646, в составе:
 - Абатмент NEA646– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.31 Абатмент ЕрДуо NEA647, в составе:
 - Абатмент NEA647– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.32 Абатмент EpDuo NEA655, в составе:
 - Абатмент NEA655– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.33 Абатмент EpDuo NEA656, в составе:
 - Абатмент NEA656– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.34 Абатмент EpDuo NEA657, в составе:
 - Абатмент NEA657– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.35 Абатмент EpDuo NEA715, в составе:
 - Абатмент NEA715– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.36 Абатмент EpDuo NEA716, в составе:
 - Абатмент NEA716– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.37 Абатмент EpDuo NEA717, в составе:
 - Абатмент NEA717– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.38 Абатмент EpDuo NEA725, в составе:
 - Абатмент NEA725– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.39 Абатмент EpDuo NEA726, в составе:
 - Абатмент NEA726– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.40 Абатмент EpDuo NEA727, в составе:
 - Абатмент NEA727– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.41 Абатмент EpDuo NEA735, в составе:
 - Абатмент NEA735– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.42 Абатмент ЕрDuo NEA736, в составе:
 - Абатмент NEA736– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.43 Абатмент ЕрDuo NEA737, в составе:
 - Абатмент NEA737– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.44 Абатмент ЕрDuo NEA745, в составе:
 - Абатмент NEA745– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.45 Абатмент ЕрDuo NEA746, в составе:
 - Абатмент NEA746– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.46 Абатмент ЕрDuo NEA747, в составе:
 - Абатмент NEA747– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.47 Абатмент ЕрDuo NEA755, в составе:
 - Абатмент NEA755– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.48 Абатмент ЕрDuo NEA756, в составе:
 - Абатмент NEA756– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.49 Абатмент ЕрDuo NEA757, в составе:
 - Абатмент NEA757– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.50 Абатмент ЕрDuo NEALK405, в составе:
 - Абатмент NEALK405– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.51 Абатмент ЕрDuo NEALK505, в составе:
 - Абатмент NEALK505– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.52 Абатмент EpDuo NEALKN405, в составе:
 - Абатмент NEALKN405– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.53 Абатмент EpDuo NEALKN505, в составе:
 - Абатмент NEALKN505– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.54 Абатмент EpDuo NEAN505, в составе:
 - Абатмент NEAN505– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.55 Абатмент EpDuo NEAN507, в составе:
 - Абатмент NEAN507– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.56 Абатмент EpDuo NEAN515, в составе:
 - Абатмент NEAN515– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.57 Абатмент EpDuo NEAN516, в составе:
 - Абатмент NEAN516– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.58 Абатмент EpDuo NEAN517, в составе:
 - Абатмент NEAN517– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.59 Абатмент EpDuo NEAN525, в составе:
 - Абатмент NEAN525– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.60 Абатмент EpDuo NEAN526, в составе:
 - Абатмент NEAN526– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.61 Абатмент EpDuo NEAN527, в составе:
 - Абатмент NEAN527– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.62 Абатмент EpDuo NEAN535, в составе:
 - Абатмент NEAN535– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.63 Абатмент EpDuo NEAN536, в составе:
 - Абатмент NEAN536– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.64 Абатмент EpDuo NEAN537, в составе:
 - Абатмент NEAN537– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.65 Абатмент EpDuo NEAN545, в составе:
 - Абатмент NEAN545– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.66 Абатмент EpDuo NEAN546, в составе:
 - Абатмент NEAN546– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.67 Абатмент EpDuo NEAN547, в составе:
 - Абатмент NEAN547– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.68 Абатмент EpDuo NEAN555, в составе:
 - Абатмент NEAN555– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.69 Абатмент EpDuo NEAN556, в составе:
 - Абатмент NEAN556– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.70 Абатмент EpDuo NEAN557, в составе:
 - Абатмент NEAN557– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.71 Абатмент EpDuo NEAN605, в составе:
 - Абатмент NEAN605– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.72 Абатмент EpDuo NEAN607, в составе:
 - Абатмент NEAN607– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.73 Абатмент EpDuo NEAN615, в составе:
 - Абатмент NEAN615– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.74 Абатмент EpDuo NEAN616, в составе:
 - Абатмент NEAN616– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.75 Абатмент EpDuo NEAN617, в составе:
 - Абатмент NEAN617– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.76 Абатмент EpDuo NEAN625, в составе:
 - Абатмент NEAN625– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.77 Абатмент EpDuo NEAN626, в составе:
 - Абатмент NEAN626– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.78 Абатмент EpDuo NEAN627, в составе:
 - Абатмент NEAN627– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.79 Абатмент EpDuo NEAN635, в составе:
 - Абатмент NEAN635– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.80 Абатмент EpDuo NEAN636, в составе:
 - Абатмент NEAN636– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.81 Абатмент EpDuo NEAN637, в составе:
 - Абатмент NEAN637– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.82 Абатмент EpDuo NEAN645, в составе:
 - Абатмент NEAN645– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.83 Абатмент EpDuo NEAN646, в составе:
 - Абатмент NEAN646– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.84 Абатмент EpDuo NEAN647, в составе:
 - Абатмент NEAN647– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.85 Абатмент EpDuo NEAN655, в составе:
 - Абатмент NEAN655– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.86 Абатмент EpDuo NEAN656, в составе:
 - Абатмент NEAN656– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.87 Абатмент EpDuo NEAN657, в составе:
 - Абатмент NEAN657– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.88 Абатмент EpDuo NEAN715, в составе:
 - Абатмент NEAN715– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.89 Абатмент EpDuo NEAN716, в составе:
 - Абатмент NEAN716– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.90 Абатмент EpDuo NEAN717, в составе:
 - Абатмент NEAN717– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.91 Абатмент EpDuo NEAN725, в составе:
 - Абатмент NEAN725– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 8.92 Абатмент EpDuo NEAN726, в составе:
 - Абатмент NEAN726– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.93 Абатмент EpDuo NEAN727, в составе:
 - Абатмент NEAN727– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.94 Абатмент EpDuo NEAN735, в составе:
 - Абатмент NEAN735– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.95 Абатмент EpDuo NEAN736, в составе:
 - Абатмент NEAN736– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.96 Абатмент EpDuo NEAN737, в составе:
 - Абатмент NEAN737– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.97 Абатмент EpDuo NEAN745, в составе:
 - Абатмент NEAN745– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.98 Абатмент EpDuo NEAN746, в составе:
 - Абатмент NEAN746– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.99 Абатмент EpDuo NEAN747, в составе:
 - Абатмент NEAN747– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.100 Абатмент EpDuo NEAN755, в составе:
 - Абатмент NEAN755– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 8.101 Абатмент EpDuo NEAN756, в составе:
 - Абатмент NEAN756– 1 шт.
 - Винт NOASL – 1 шт.



- Инструкция по применению

8.102 Абатмент EpDuo NEAN757, в составе:

- Абатмент NEAN757– 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт.

- Инструкция по применению

9 Абатмент угловой

9.1 Абатмент угловой SAAR15, в составе:

- Абатмент SAAR15– 1 шт.

- Винт SAARS – 1 шт.

- Инструкция по применению

9.2 Абатмент угловой SAAR25, в составе:

- Абатмент SAAR25– 1 шт.

- Винт SAARS – 1 шт.

- Инструкция по применению

9.3 Абатмент угловой SAARN15, в составе:

- Абатмент SAARN15– 1 шт.

- Винт SAARS – 1 шт.

- Инструкция по применению

9.4 Абатмент угловой SAARN25, в составе:

- Абатмент SAARN25– 1 шт.

- Винт SAARS – 1 шт.

- Инструкция по применению

10 Абатмент BLT OS BestSolid

10.1 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3514, в составе:

- Абатмент ONSAM3514– 1 шт.

- Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.

- Инструкция по применению

10.2 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3517, в составе:

- Абатмент ONSAM3517– 1 шт.

- Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.

- Инструкция по применению

10.3 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3524, в составе:

- Абатмент ONSAM3524– 1 шт.

- Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.

- Инструкция по применению

10.4 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3527, в составе:

- Абатмент ONSAM3527– 1 шт.

- Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.

- Инструкция по применению

10.5 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3534, в составе:

- Абатмент ONSAM3534– 1 шт.
- Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.6 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3537, в составе:
 - Абатмент ONSAM3537– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.7 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3544, в составе:
 - Абатмент ONSAM3544– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.8 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3547, в составе:
 - Абатмент ONSAM3547– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.9 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3554, в составе:
 - Абатмент ONSAM3554– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM354 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.10 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM3557, в составе:
 - Абатмент ONSAM3557– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM357 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.11 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4014, в составе:
 - Абатмент ONSAM4014– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.12 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4017, в составе:
 - Абатмент ONSAM4017– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.13 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4024, в составе:
 - Абатмент ONSAM4024– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.14 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4027, в составе:
 - Абатмент ONSAM4027– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.15 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4034, в составе:

- Абатмент ONSAM4034– 1 шт.
- Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.16 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4037, в составе:
 - Абатмент ONSAM4037– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.17 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4044, в составе:
 - Абатмент ONSAM4044– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.18 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4047, в составе:
 - Абатмент ONSAM4047– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.19 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4054, в составе:
 - Абатмент ONSAM4054– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM404– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.20 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAM4057, в составе:
 - Абатмент ONSAM4057– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSCM407– 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.21 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR414, в составе:
 - Абатмент ONSAR414– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.22 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR417, в составе:
 - Абатмент ONSAR417– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.23 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR424, в составе:
 - Абатмент ONSAR424– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.24 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR427, в составе:
 - Абатмент ONSAR427– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.25 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR434, в составе:

- Абатмент ONSAR434– 1 шт.
- Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.26 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR437, в составе:
 - Абатмент ONSAR437– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.27 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR444, в составе:
 - Абатмент ONSAR444– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.28 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR447, в составе:
 - Абатмент ONSAR447– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.29 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR454, в составе:
 - Абатмент ONSAR454– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.30 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR457, в составе:
 - Абатмент ONSAR457– 1 шт.
 - Защитный колпачок PSC70 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.31 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR514, в составе:
 - Абатмент ONSAR514– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.32 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR517, в составе:
 - Абатмент ONSAR517– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.33 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR524, в составе:
 - Абатмент ONSAR524– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.34 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR527, в составе:
 - Абатмент ONSAR527– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.35 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR534, в составе:

- Абатмент ONSAR534– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.36 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR537, в составе:
- Абатмент ONSAR537– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.37 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR544, в составе:
- Абатмент ONSAR544– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.38 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR547, в составе:
- Абатмент ONSAR547– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.39 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR554, в составе:
- Абатмент ONSAR554– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC52 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.40 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR557, в составе:
- Абатмент ONSAR557– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC55 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.41 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR614, в составе:
- Абатмент ONSAR614– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.42 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR617, в составе:
- Абатмент ONSAR617– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.43 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR624, в составе:
- Абатмент ONSAR624– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.44 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR627, в составе:
- Абатмент ONSAR627– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.45 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR634, в составе:

- Абатмент ONSAR634– 1 шт.
- Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
- Инструкция по применению
- 10.46 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR637, в составе:
 - Абатмент ONSAR637– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.47 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR644, в составе:
 - Абатмент ONSAR644– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.48 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR647, в составе:
 - Абатмент ONSAR647– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.49 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR654, в составе:
 - Абатмент ONSAR654– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC64 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 10.50 Абатмент BLT OS BestSolid ONSAR657, в составе:
 - Абатмент ONSAR657– 1 шт.
 - Защитный колпачок PEC67 – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 11 Абатмент BLT OS Customized
 - 11.1 Абатмент BLT OS Customized OBCMAM10, в составе:
 - Абатмент OBCMAM10 – 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 11.2 Абатмент BLT OS Customized OBCMAR10, в составе:
 - Абатмент OBCMAR10– 1 шт.
 - Винт ONOASR – 1 шт.
 - Инструкция по применению
- 12 Абатмент BLT OS Multi-Unit
 - 12.1 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM010, в составе:
 - Абатмент OMUAM010– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт.
 - Инструкция по применению
 - 12.2 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM020, в составе:
 - Абатмент OMUAM020– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт.

- Инструкция по применению
- 12.3 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM030, в составе:
 - Абатмент OMUAM030– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.4 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM040, в составе:
 - Абатмент OMUAM040– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.5 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM050, в составе:
 - Абатмент OMUAM050– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.6 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM1725, в составе:
 - Абатмент OMUAM1725– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.7 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM1730, в составе:
 - Абатмент OMUAM1730– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.8 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM1740, в составе:
 - Абатмент OMUAM1740– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.9 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM3035, в составе:
 - Абатмент OMUAM3035– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.10 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM3040, в составе:
 - Абатмент OMUAM3040– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.11 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAM3050, в составе:
 - Абатмент OMUAM3050– 1 шт.
 - Винт OMUASM – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.12 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR010, в составе:
 - Абатмент OMUAR010– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт

- Инструкция по применению
- 12.13 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR020, в составе:
 - Абатмент OMUAR020– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.14 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR030, в составе:
 - Абатмент OMUAR030– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.15 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR040, в составе:
 - Абатмент OMUAR040– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.16 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR050, в составе:
 - Абатмент OMUAR050– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.17 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR1725, в составе:
 - Абатмент OMUAR1725– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.18 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR1730, в составе:
 - Абатмент OMUAR1730– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.19 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR1740, в составе:
 - Абатмент OMUAR1740– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.20 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR3035, в составе:
 - Абатмент OMUAR3035– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.21 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR3040, в составе:
 - Абатмент OMUAR3040– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт
- Инструкция по применению
- 12.22 Абатмент BLT OS Multi-Unit OMUAR3050, в составе:
 - Абатмент OMUAR3050– 1 шт.
 - Винт OMUASR – 1 шт

- Инструкция по применению

13 Абатмент Precision Gold UCLA

13.1 Абатмент Precision Gold UCLA EIGUB, в составе:

- Абатмент EIGUB – 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт

- Инструкция по применению

13.2 Абатмент Precision Gold UCLA EBGUB, в составе:

- Абатмент EBGUB – 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт

- Инструкция по применению

13.3 Абатмент Precision Gold UCLA EBGUC, в составе:

- Абатмент EBGUC – 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт

- Инструкция по применению

13.4 Абатмент Precision Gold UCLA EIGUC, в составе:

- Абатмент EIGUC – 1 шт.

- Винт NOASL – 1 шт

- Инструкция по применению

14 Абатмент Octa

14.1 Абатмент Octa SOA, в составе:

- Абатмент SOA – 1 шт.

- Инструкция по применению

15. Абатмент Solid

15.1 Абатмент Solid SSAR30, в составе:

- Абатмент SSAR30– 1 шт.

- Защитный колпачок PSC40 – 1 шт.

- Инструкция по применению

15.2 Абатмент Solid SSAR40, в составе:

- Абатмент SSAR40– 1 шт.

- Защитный колпачок PSC40– 1 шт.

- Инструкция по применению

15.3 Абатмент Solid SSAR55, в составе:

- Абатмент SSAR55– 1 шт.

- Защитный колпачок PSC55– 1 шт.

- Инструкция по применению

15.4 Абатмент Solid SSAR70, в составе:

- Абатмент SSAR70– 1 шт.

- Защитный колпачок PSC70– 1 шт.

- Инструкция по применению

16. Абатмент Precision Temporary

16.1 Абатмент Precision Temporary TAO417, в составе:

- Абатмент TAO417– 1 шт.

- Винт SAARS – 1 шт.

- Инструкция по применению

16.2 Абатмент Precision Temporary TAO437, в составе:

- Абатмент TAO437– 1 шт.

- Винт SAARS – 1 шт.

- Инструкция по применению



8. Маркировка и упаковка

Абатменты упаковываются в первичную упаковку, которая представляет из себя алюминиевый пакет.

Маркировка первичной и потребительской упаковок содержит: информацию о производителе, место производства, информацию об уполномоченном производителе, номер серии/партии, срок годности, номер регистрационного удостоверения

Макет маркировки упаковки

Символы изделия

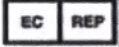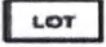№	Используемый символ	Описание	№	Используемый символ	Описание
1		Изготовитель	2		Маркировка CE утверждена XXXX
3		Уполномоченный представитель Европейском сообществе	4		Код партии
5		Температурный диапазон	6		Осторожно
7		Дата изготовления	8		Запрет на повторное применение
9		Номер по каталогу	10		Не стерильно
11		Тип отвертки. HEX - шестигранная с рабочей часть	12	 	Тип отвертки. OCTA – восьмигранная с рабочей часть.
13	QTY	Количество	14		QR-код

9. Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»,
ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»,

ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»,

ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibilизирующего действия»

ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»

ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Отбор и подготовка образцов для проведения исследований»

10. Транспортирование, хранение и эксплуатация

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями:

Хранение и эксплуатация

1) Храните изделие в сухом месте при температуре 1~35°C и предпринимайте меры с целью предотвращения повреждений или разгерметизации в процессе стерилизации.

2) Упаковку следует открывать только непосредственно перед операцией.

3) Изделие следует устанавливать с помощью оборудования, которое должно быть таким же безопасным, как и медицинское оборудование.

4) Запрещается использовать изделие, если его упаковка открыта или само изделие повреждено и изделие невозможно вернуть производителю.

Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями:

Хранение: 1~35°C, относительная влажность менее 70 %

Транспортировка: -20°C~50°C

Эксплуатация: 15~22°C, относительная влажность менее 70 %

срок годности составляет 5 лет.

11. Сведения о стерильности изделия

Абатменты в процессе производства проходят ультразвуковую очистку, поставляются не стерильными и перед применением подлежат стерилизации.

Перед применением необходимо стерилизовать паром в течение 15 минут при температуре 121°C. После стерилизации паром и перед использованием компоненты абатменты просушить в течение 15 минут. Изделия, прошедшие стерилизацию, следует хранить в стерилизационных пакетах. Пакеты следует вскрывать непосредственно перед использованием изделия. Перед вскрытием пакетов проверить их целостность.

12. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

При неиспользовании изделия, повреждения индивидуальной упаковки и истечении срока хранения утилизацию проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

13. Гарантии

Гарантийный срок хранения – 5 лет Срок годности – 5 лет

Производитель:

Evidence Implant Inc. (Евиденс Имплант Инк.), Республика Корея

#32, Innovalley-ro, Dong-gu, Daegu, Republic of Korea

Телефон: 053-817-7767

Факс: 053-817-7768

e-mail: ceo@ebiimplant.com

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»

129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1

Тел.: +7 (499) 281-67-68

e-mail: tatiana.nosova@beawire.com

등부 2024년 제 3722 호

Registered NO. 2024 - 3722

인 증

Notarial Certificate

위 사 용 설 명 서 에
기재된 주식회사 에비던스임플란트
대표 이사 양 동 준
의 대리인 여 상 훈 은
본 공증인의 면전에서 위 본인이
기명 날인한 것임을 확인하였다.


YEO SANGHOON attorney-in-fact of
EVIDENCE IMPLANT INC.
YANG DONG JUN / CEO
appeared before me and
admitted said principal's
subscription to the attached

Instruction for Use

2024 년 11 월 6 일
이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
6th day of NOV, 2024 at this office.

공증인 정 병 칠 사무소
소속 대구지방검찰청

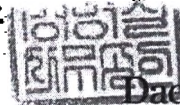

Byeong Chil. Jung
Notary's Office.
Daegu District Prosecutors' Office

대구광역시 달서구 용산로 160,
우방죽전타운상가 205호 (용산동)

Woobang Jukjeon Town Apartment Store
#205, 160 Yongsan-ro, Dalseo-gu, Daegu

공증인

Attorney-at-Law



This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public since
MAR 22, 2004 Under Law No. 88

Перевод с английского и корейского, языка на русский язык

Форма №41

Регистрационный № 2024 -3722

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Тисненая печать: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА БЭЙОН ЧИЛ, ЧАН

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА БЭЙОН ЧИЛ, ЧАН

Адрес: г. Тэгу, район Далсо-гу, Йонсан-ро 160, Вубанг Джукджэон Таун Апартамент Стор № 205

Нотариальная контора Бэйон Чил. Чан. Тел.: (053)561-2277-8, Факс: (053)561-2279

ОДОБРЕНО:


Заместитель директора

/подпись/

Сан-Хун Ё


25 октября 2024 г.

Печать: [«Евиденс Имплант Инк.», 32, Инновэлли-ро, Тонг-гу, Тэгу, Республика Корея,
502-81-65944]

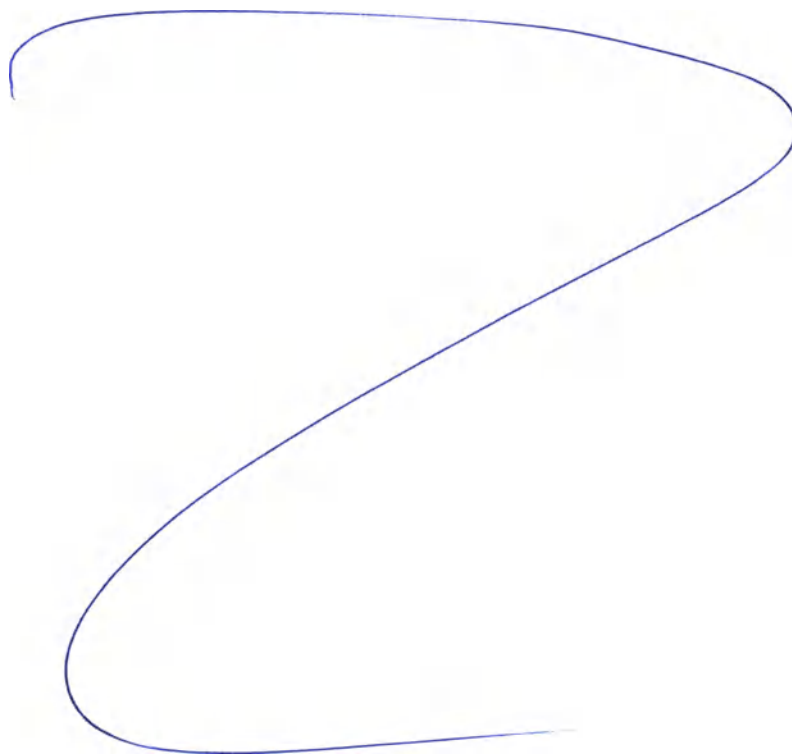

	Регистрационный номер 2024 – 3722 Нотариальное свидетельство Ё САН-ХУН, лицо, действующее по доверенности от компании «ЕВИДЕНС ИМПЛАНТ ИНК.»/ генеральный директор ЯН ТОН ЧУН явился к нам и подтвердил подпись указанного доверителя на приложенной Инструкции по применению Данный факт засвидетельствован настоящим документом сегодня, 06 ноября 2024 г., в указанной нотариальной конторе. Нотариальная контора Бэйон Чил. Чан. Бюро прокурора Тэгу г. Тэгу, район Далсо-гу, Йонсан-ро 160, Вубанг Джукджеон Таун Апартамент Стор № 205 Присяжный поверенный /подпись/ В соответствии с Законом № 88 Указанная юридическая компания уполномочена Министерством юстиции Республики Корея на осуществление нотариальной деятельности с 22 марта 2004 г.
--	---

Нотариальная контора Бэйон Чил. Чан. Тел.: (053)561-2277-8, Факс: (053)561-2279

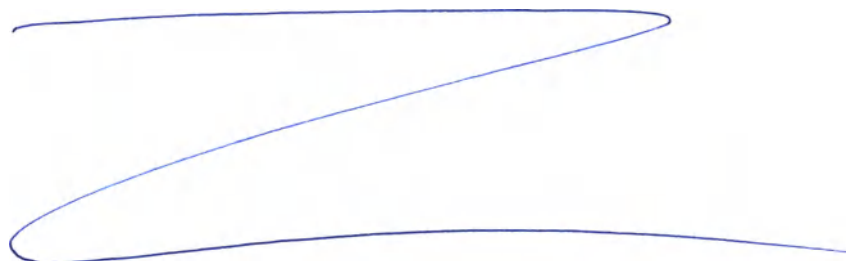

Перевод данного текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной.

Российская Федерация.

Город Москва.

Двадцать первого ноября две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2024-38-3572

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.Е. Прокошенкова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 64 лист (-а, -ов).

Е.Е. Прокошенкова

Large blue signature of E.E. Prokoshenkova.