

**Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая
(Бактоагар Плоскирева)
по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019**

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

«24» 2024 г.
О.М. Волощук



1. Маркировка на этикетке банки:

Размер этикетки: 221x75 мм

Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте. Хранить после вскрытия упаковки в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С в герметично закрытом виде. Гигроскопична. Светочувствительна LOT C Дата изготовления Годен до Акционерное общество «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1 тел. (8722) 55-82-32 ШТРИХ-КОД	Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019 Состав (комплектность) медицинского изделия: - Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019, 1 банка, 250 г; - инструкция по применению; - паспорт качества. Для профессионального применения Р № Масса нетто г МИКРОГЕН	Способ применения: г сухой питательной среды размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 2 мин, периодически перемешивая до полного расплавления агара. Среду охлаждают до температуры 40-45 °С, разливают в чашки Петри слоем 5-6 мм и подсушивают с открытыми крышками в течение 1,5 ч при температуре 18-25 °С, соблюдая правила асептики. Готовую среду можно использовать в течение 7 сут при условии хранения при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Одной упаковки достаточно для проведения не менее 135 исследований Средство идентификации*
--	---	---

• Место для нанесения средства идентификации


Переменная информация, наносимая при выпуске:
номер серии, дата изготовления, срок годности, масса нетто,
номер регистрационного удостоверения, масса навески.

* В случае ввода в действие соответствующего оборудования на производстве маркировка может быть дополнена информацией о медицинском изделии в машиночитаемом формате (средство идентификации)

**Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая
(Бактоагар Плоскирева)
по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019**

2. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

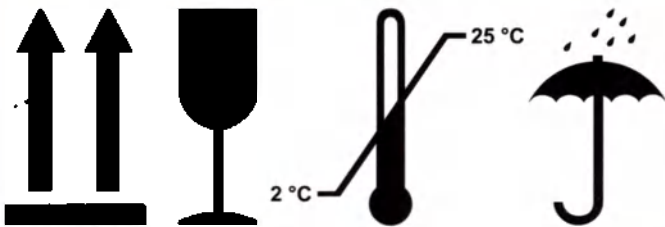 Не кантовать!	LOT Серия: Дата изготовления: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:
Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 25 °С. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.	МИКРОХГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кяхулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1 тел. (8722) 55-82-32
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	


УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

ОМ Волощук
«10» 2024 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
О.М. ВОЛОЩУК



Не кантовать!	Серия: <u>Мк 160419</u> Дата изготовления: <u>04.2019г.</u> Годен до: <u>04.2022г.</u> Число единиц потребит. упак. изделия: <u>20 шт.</u>
Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 25 °С. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.	МИКРОГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кихулай, ул. Декоративная, д. 89, строение 1 тел. (8722) 55-82-32
Масса брутто <u>6,085 кг</u> Масса нетто <u>5 кг</u> Масса нетто потребит. упак. <u>0,250 кг</u>	

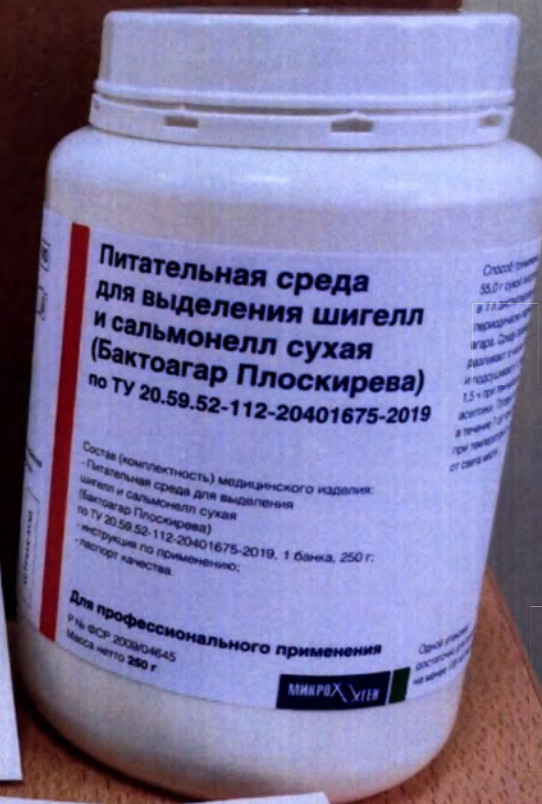

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
**Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая
(Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019**


Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Махачкала «НПО «Питательные среды»
367915, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Новый Кихулай, ул. Декоративная, д. 89

ПАСПОРТ № 65

Наименование изделия: Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая
(Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04645
Количество, ед. измерения 65,0 кг 260 банок
Состав (комплектность) медицинского изделия:

Номер серии (партии) Мк160419

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
О.М. Волощук

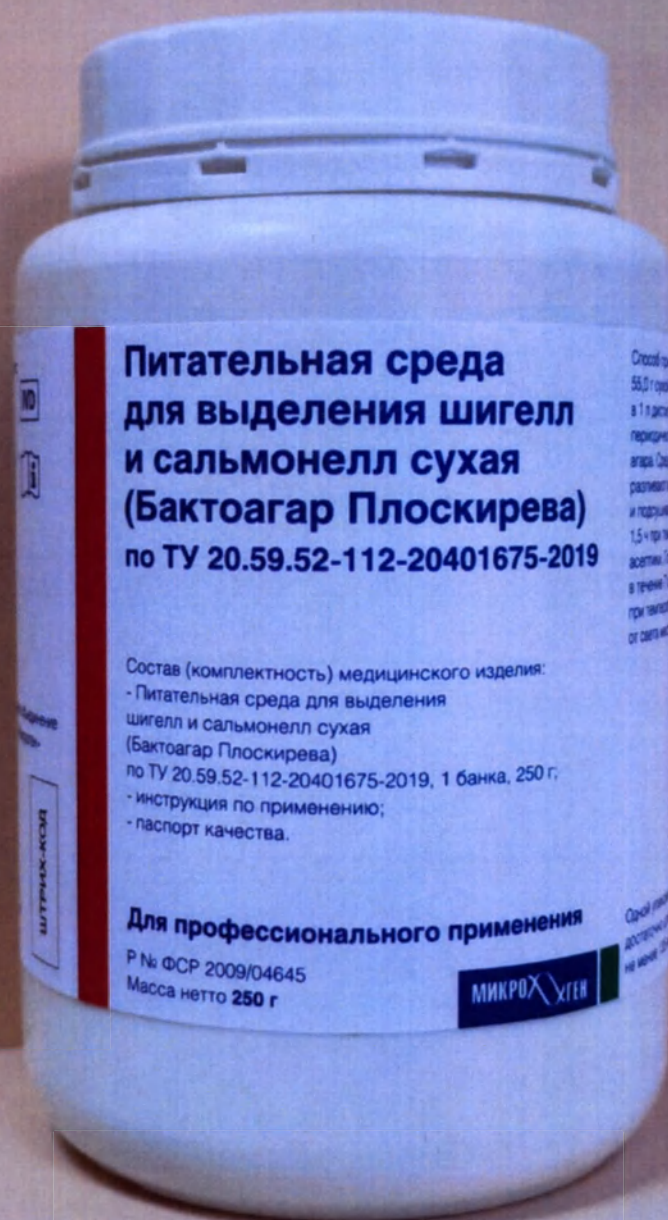

**Питательная среда
для выделения шигелл
и сальмонелл сухая
(Бактоагар Плоскирева)
по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019**

Состав (комплектность) медицинского изделия:


- Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева) по ТУ 20.59.52-112-20401675-2019, 1 банка, 250 г;
- инструкция по применению;
- паспорт качества.

Для профессионального применения


Р № ФСР 2009/04645
Масса нетто 250 г

МИКРОХИГЕН

Представитель
АО НПО «Микроген»
по доверенности
О.М. Винощук

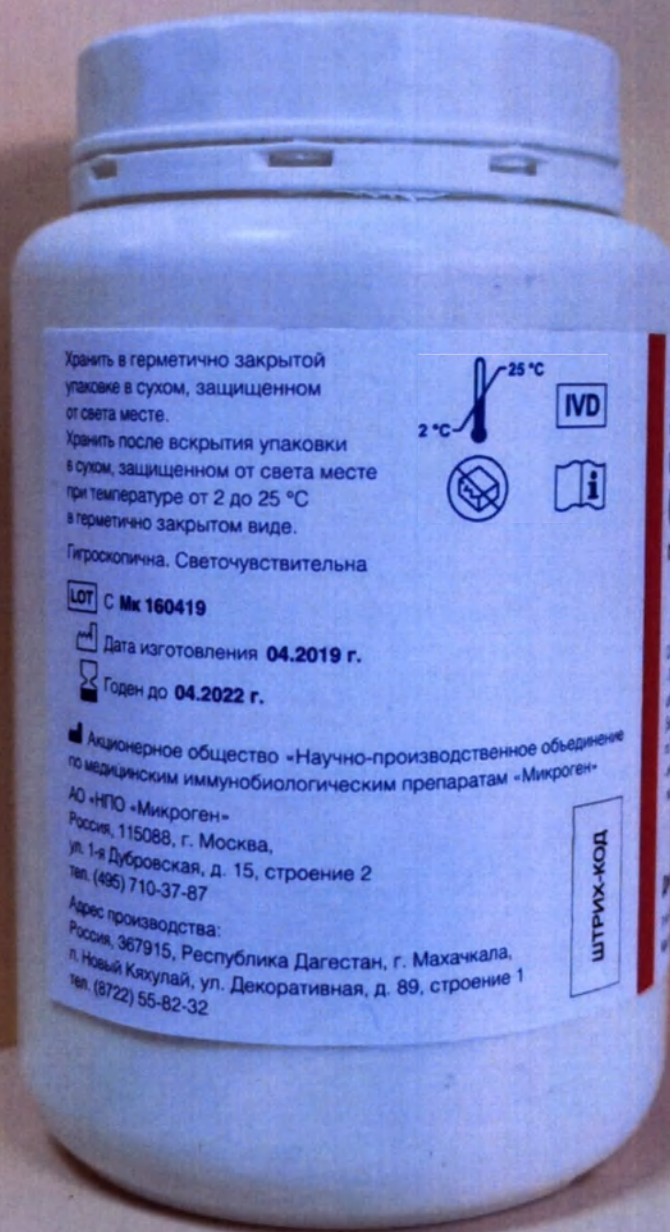

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОМ ВПОЩУК

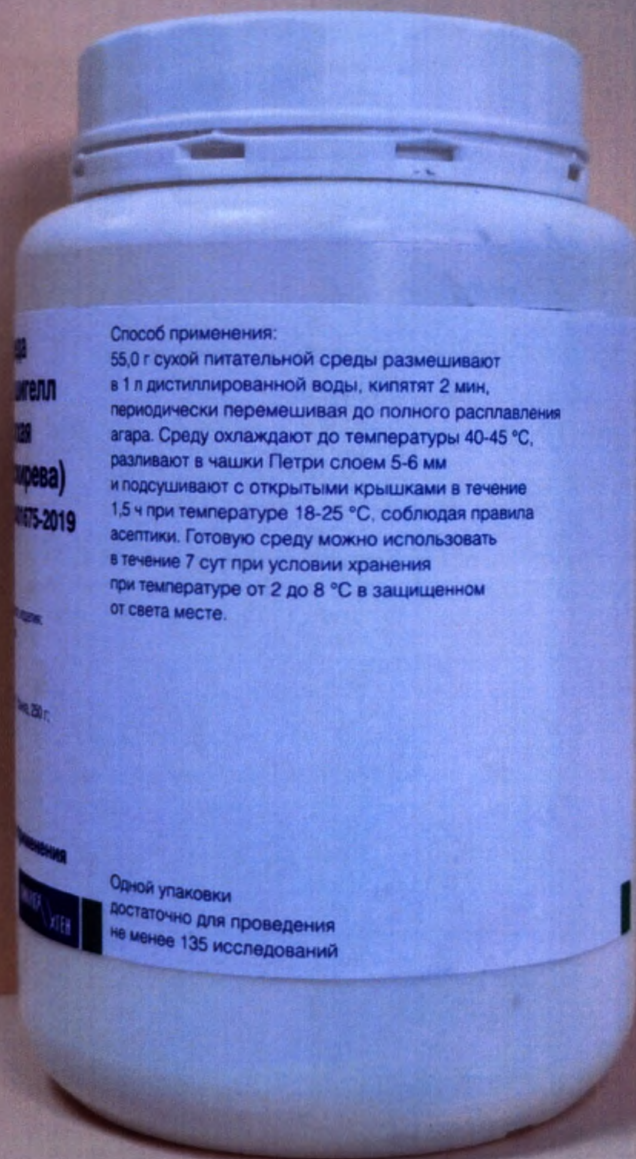

Способ применения:

55,0 г сухой питательной среды размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят 2 мин, периодически перемешивая до полного расплавления агара. Среду охлаждают до температуры 40-45 °С, разливают в чашки Петри слоем 5-6 мм и подсушивают с открытыми крышками в течение 1,5 ч при температуре 18-25 °С, соблюдая правила асептики. Готовую среду можно использовать в течение 7 сут при условии хранения при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.

Одной упаковки
достаточно для проведения
не менее 135 исследований