

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "Имплант Инжиниринг"
Соколов А.В.

« 1 » октября 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие

Система ортодонтических брекетов «NEXSTEP»
по ТУ 32.50.11-001-44239251-2024

Оглавление

Наименование и комплект поставки медицинского изделия	3
Сведения о производителе	11
Назначение медицинского изделия	11
Общее описание изделия	11
Принцип действия медицинского изделия	12
Показания к применению	12
Противопоказания к применению	12
Возможные побочные действия	12
Условия применения.....	12
Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия	12
Классификация медицинского изделия	13
Меры предосторожности	13
Условия эксплуатации.....	13
Требования к транспортированию и хранению	13
Порядок применения	13
Основные технические характеристики	14
Вид контакта с организмом человека.....	14
Перечень материалов медицинского изделия	14
Сведения о маркировке	16
Сведения об упаковке медицинского изделия	17
Сведения о совместимых медицинских изделиях	18
Очистка, дезинфекция и стерилизация	18
Порядок и условия утилизации	18
Срок службы.....	18
Гарантии производителя.....	18
Перечень применяемых стандартов	18

Версия № 1.1

Наименование и комплект поставки медицинского изделия

Система ортодонтических брекетов «NEXSTEP» по ТУ 32.50.11-001-44239251-2024

1. Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Pro»

- 1.1 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 11 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.2 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 11 зуб, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.3 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 11 зуб, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.4 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 12 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.5 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 12 зуб, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.6 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 12 зуб, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.7 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.8 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.9 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.10 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, с крючком, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.11 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.12 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, с крючком, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.13 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 14 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.14 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 14 зуб, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.15 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 15 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.16 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 15 зуб, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.17 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 21 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.18 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 21 зуб, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.19 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 21 зуб, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.20 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 22 зуб, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.21 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 22 зуб, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;

- 4

- 1.45 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 34 зуба, с крючком, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.46 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 35 зубов, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.47 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 35 зубов, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.48 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 41 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.49 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 41 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.50 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 42 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.51 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 42 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.52 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.53 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуба, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.54 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.55 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуба, с крючком, низкий торк – не более 100 шт.;
- 1.56 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуба, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.57 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуба, с крючком, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.58 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 44 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.59 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 44 зуба, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.60 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 44 зуба, с крючком, высокий торк – не более 100 шт.;
- 1.61 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 45 зубов, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 1.62 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 45 зубов, с крючком, стандартный торк – не более 100 шт.;

2. Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Q»

- 2.1 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 11 зубов, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.2 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 11 зубов, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 2.3 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 11 зубов, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 2.4 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 12 зубов, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;

- 6

- 2.28 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 33 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 2.29 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 33 зуба, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 2.30 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 34 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.31 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 34 зуба, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 2.32 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 35 зубов, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.33 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 41 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.34 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 41 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 2.35 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 42 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.36 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 42 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 2.37 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 43 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.38 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 43 зуба, без крючка, низкий торк – не более 100 шт.;
- 2.39 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 43 зуба, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 2.40 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 44 зуба, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.41 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 44 зуба, без крючка, высокий торк – не более 100 шт.;
- 2.42 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 45 зубов, без крючка, стандартный торк – не более 100 шт.;
- 2.43 Вставной крючок для модели брекетов «NexStep Q» на 3, 4, 5 зубов

3. Металлическая самолигирующая брекет-система «NexStep Ultra»

- 3.1 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 11 зубов, без крючка, пропись Roth – не более 100 шт.;
- 3.2 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 12 зубов, без крючка, пропись Roth – не более 100 шт.;
- 3.3 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 13 зубов, с крючком, пропись Roth – не более 100 шт.;
- 3.4 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 14 зубов, с крючком, пропись Roth – не более 100 шт.;
- 3.5 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 15 зубов, с крючком, пропись Roth – не более 100 шт.;
- 3.6 Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 21 зуба, без крючка, пропись Roth – не более 100 шт.;

- 8

- 3.30 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 25 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.31 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 31 зуб, без крючка, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.32 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 32 зуб, без крючка, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.33 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 33 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.34 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 34 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.35 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 35 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.36 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 41 зуб, без крючка, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.37 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 42 зуб, без крючка, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.38 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 43 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.39 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 44 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;
- 3.40 Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 45 зуб, с крючком, пропись MBT – не более 100 шт.;

4. Самолигирующие щечные трубки

- 4.1 Щечная трубка металлическая самолигирующая на 16 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 4.2 Щечная трубка металлическая самолигирующая на 26 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 4.3 Щечная трубка металлическая самолигирующая на 36 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 4.4 Щечная трубка металлическая самолигирующая на 46 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;

5. Щечные трубки

- 5.1 Щечная трубка металлическая на 16 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.2 Щечная трубка металлическая на 17 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.3 Щечная трубка металлическая на 26 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.4 Щечная трубка металлическая на 27 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.5 Щечная трубка металлическая на 36 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.6 Щечная трубка металлическая на 37 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.7 Щечная трубка металлическая на 46 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.8 Щечная трубка металлическая на 47 зуб стандартная пропись – не более 100 шт.;
- 5.9 Щечная трубка металлическая на 16 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.10 Щечная трубка металлическая на 17 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.11 Щечная трубка металлическая на 26 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;

- 5.12 Щечная трубка металлическая на 27 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.13 Щечная трубка металлическая на 36 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.14 Щечная трубка металлическая на 37 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.15 Щечная трубка металлическая на 46 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.16 Щечная трубка металлическая на 47 зуб пропись Roth – не более 100 шт.;
- 5.17 Щечная трубка металлическая на 16 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.18 Щечная трубка металлическая на 17 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.19 Щечная трубка металлическая на 26 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.20 Щечная трубка металлическая на 27 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.21 Щечная трубка металлическая на 36 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.22 Щечная трубка металлическая на 37 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.23 Щечная трубка металлическая на 46 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;
- 5.24 Щечная трубка металлическая на 47 зуб пропись MBT – не более 100 шт.;

6. Ортодонтические дуги

- 6.1 Ортодонтическая дуга ТМА (Форма сечения – прямоугольная, формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.2 Ортодонтическая дуга ТМА (Форма сечения – прямоугольная, формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.3 Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами (Форма сечения – круглая) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.4 Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами (Форма сечения – круглая) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.5 Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами (Форма сечения – прямоугольная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.6 Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами (Форма сечения – прямоугольная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.7 Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI (Форма сечения – круглая; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.8 Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI (Форма сечения – круглая; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.9 Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI (Форма сечения – прямоугольная; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.10 Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI (Форма сечения – прямоугольная; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.11 Ортодонтическая дуга - Stainless Steel (Форма сечения – круглая; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.12 Ортодонтическая дуга - Stainless Steel (Форма сечения – круглая; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.13 Ортодонтическая дуга - Stainless Steel (Форма сечения – прямоугольная; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.14 Ортодонтическая дуга - Stainless Steel (Форма сечения – прямоугольная; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.15 Ортодонтическая дуга - Thermal Active (Форма сечения – круглая; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;

- 6.16 Ортодонтическая дуга - Thermal Active (Форма сечения – круглая; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.17 Ортодонтическая дуга - Thermal Active (Форма сечения – прямоугольная; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.18 Ортодонтическая дуга - Thermal Active (Форма сечения – прямоугольная; Формы дуг - Овальная, Натуральная) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.19 Ортодонтическая дуга - Reverse Curve (Форма сечения – круглая) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.20 Ортодонтическая дуга - Reverse Curve (Форма сечения – круглая) на нижнюю челюсть – не более 100 шт.;
- 6.21 Ортодонтическая дуга - Reverse Curve (Форма сечения – прямоугольная) на верхнюю челюсть – не более 100 шт.

– Инструкция по применению – 1 шт.

далее – «брекет-система», «брекеты», «изделия».



Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Имплант Инжиниринг»
(ООО «Имплант Инжиниринг»).

Адрес юридического лица: 141401, Московская область, г Химки, Рабочая ул, д. 2а, к. 3 помещ. 84.

Номера телефонов: +7 (925) 092-44-44

Адрес электронной почты: info@implant-rus.ru

Назначение медицинского изделия

Система ортодонтических брекетов «NEXSTEP» по ТУ 32.50.11-001-44239251-2024 предназначена для выравнивания зубов человека.

Общее описание изделия

Брекет-система "NexStep" состоит из трех различных видов брекетов (NexStep Pro, NexStep Q и NexStep Ultra с крючком или без; щечных трубок (самолигирующих и нет) и ортодонтических дуг разных размеров и форм. Брекеты различной формы (низкий, стандартный, высокий торк, Roth, MBT) приклеиваются основанием к поверхности соответствующих зубов на нижнюю и верхнюю челюсть: резцы № 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, клыки № 13, 23, 33, 43 и премоляры № 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45. Щечные трубки (замки) приклеиваются к поверхности соответствующих зубов: моляры № 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47.

Схематичное изображение расположения и номеров зубов:



Принцип действия медицинского изделия

Брекеты и щечные трубки удерживают ортодонтическую дугу, которая оказывает давление на зубы, чтобы изменить их положение, что отслеживается стоматологами или ортодонтами.

Показания к применению

Для обеспечения ортодонтического перемещения и выравнивания зубов во время ортодонтического лечения.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Возможные побочные действия

Побочным эффектом ношения брекетов является то, что выступающие элементы конструкций натирают слизистую оболочку полости рта. Брекеты могут первое время травмировать щеки, губы, провоцируя возникновение небольших покраснений и ранок.

Наличие брекетов в полости рта усложняют осуществление качественной гигиены полости рта, что может приводить к деминерализации эмали и возникновению кариеса, а также гингивиту.

Условия применения

Изделие применяется в условиях стоматологических медицинских учреждений.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Брекеты предназначены для применения квалифицированным медицинским персоналом.

Классификация медицинского изделия

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 236390.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 2а.

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: 32.50.11.110.

Меры предосторожности

1. Данная продукция должна быть установлена доктором узкой специальности.
2. Необходимо очистить продукцию перед началом использования. Обычная чистка или протирание спиртовым раствором, чистка без изменения формы или цвета не повлияет на использование.
3. Изделия только для одноразового применения.
4. После использования следует утилизировать должным образом.

Условия эксплуатации

Изделия эксплуатируются при номинальных значениях температуры от 32°C до 42°C.

Требования к транспортированию и хранению

1. Изделие, упакованное в транспортную тару, можно перевозить всеми видами транспортных средств, кроме открытого транспорта и не отапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.
2. Изделия при транспортировании и хранении устойчивы при номинальных значениях температуры от -50°C до +50°C.
3. Хранить следует при относительной влажности воздуха не более 80%, некоррозийной среде, чистом и хорошо проветриваемом помещении.

Порядок применения

1. Выберите подходящий размер брекетов в соответствии с ортодонтическими показаниями. Захватывайте брекеты пинцетом за мезиально-дистальные поверхности или за дистальное и мезиальное крыло брекета. Берегите основание брекета от загрязнения, это может отрицательно повлиять на качество крепления.
2. Необходимо продезинфицировать брекеты перед использованием, погрузив брекеты в 75-процентный раствор этилового спирта на 20-30 минут, и затем 3 раза промыть водой и просушить.
3. Очистите поверхности зубов. Тщательно проверьте каждый зуб на наличие/отсутствие повреждений эмали.
4. С помощью позиционера для металлических брекетов (не входит в комплект поставки) наметьте нулевую линию.
5. Подготовьте ортодонтический клей в соответствии с инструкциями производителя. Соблюдайте инструкции производителя ортодонтического клея для сохранения хорошего состояния зубов.
6. Сначала нанесите немного клея на поверхность очищенных зубов и распределите его тонким слоем с помощью пульверизатора. Затем нанесите небольшое количество связующего

вещества на базовую пластину брекета, установите брекет в нужное место и прижмите. В завершение удалите излишки адгезива вокруг брекета, чтобы поверхность зуба осталась ровной.

7. Закрепите брекет посредством световой полимеризации после его установки в нужную позицию.

8. Установка дуги и лигирование. Лигирование можно выполнить обычным способом после затвердевания клея.

9. Снятие брекетов. Брекеты можно отсоединить с помощью инструмента для удаления брекетов или плоскогубцев Вейнгарт. Возьмитесь за брекет мезиально и дистально и осторожно отсоедините основание брекета от зуба, закрывая плоскогубцы и сгибая брекеты. Затем, при необходимости, снимите брекет с зуба. Не тяните брекет, а быстро поворачивайте его вправо или влево.

Основные технические характеристики

Массогабаритные характеристики компонентов системы представлены в Приложении А.

Требования к металлическим брекетам:

- Форма всех видов брекетов соответствует заявленным проектным требованиям и не имеет каких-либо дефектов, таких как сколы и трещины. Более того, вся поверхность брекета, кроме нижней его части (и поверхности приклеивания к эмали) гладкая.
- Два крыла, несущие функцию удерживания дуги в пазах брекета, находятся симметрично, обратная сторона брекета должна быть сетчатой, рифленой или иметь рифление вида «ласточкин хвост».
- Поверхность клипсы и хука гладкие, без неровностей.

Требования к ортодонтическим дугам:

- Форма всех видов дуг соответствует заявленным проектным требованиям и не имеет каких-либо внешних дефектов, таких как сколы и трещины. Вся поверхность дуги гладкая, без неровностей.
- Дуги ортодонтические имеют предел прочности не менее 1500 МПа.
- Изделия изготовлены из коррозионностойких материалов.
- Значение шероховатости поверхности изделий Ra должно быть не более 0,5 мкм.
- Поверхностная твердость по Виккерсу должна быть на уровне 250 Hv - 330 Hv.
- Изделия устойчивы к воздействию биологических жидкостей.

Вид контакта с организмом человека

Вид и длительность контакта с организмом человека – постоянный (более 30 сут.) контакт с неповрежденными слизистыми оболочками.

Перечень материалов медицинского изделия

Изделия изготовлены из следующих материалов.

Наименование	Наименование материалов, марка	Производитель материалов
Брекеты металлические самолигирующие NexStep Pro	Нержавеющая сталь марки 05Cr17Ni4Cu4Nb	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Основание металлических брекетов	Нержавеющая сталь марки 06Cr19Ni10	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)

Наименование	Наименование материалов, марка	Производитель материалов
Брекеты металлические самолигирующие NexStep Q	Нержавеющая сталь марки 05Cr17Ni4Cu4Nb	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Основание металлических брекетов	Нержавеющая сталь марки 06Cr19Ni10	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Брекеты металлические самолигирующие NexStep Ultra	Нержавеющая сталь марки 05Cr17Ni4Cu4Nb	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Основание металлических брекетов	Нержавеющая сталь марки 06Cr19Ni10	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Материал замка для всех видов брекетов и самолигирующих щечных трубок	Никель-титановый сплав с памятью формы	Dongguan Fengming special metal Co., LTD (Китай)
Металл для пайки основания и брекета	BAg48ANi	Shenzhen silver brazing materials Co., LTD (Китай)
Металлические самолигирующие щечные трубки NexStep Tube	Нержавеющая сталь марки 05Cr17Ni4Cu4Nb	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Основание металлических самолигирующих щечные трубки	Нержавеющая сталь марки 06Cr19Ni10	Hangzhou Westlake Biomaterial Co.,Ltd (Китай)
Металлические щечные трубки NexStep Tube	Нержавеющая сталь марки 05Cr17Ni4Cu4Nb	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Основание металлических щечных трубок	Нержавеющая сталь марки 06Cr19Ni10	Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd (Китай)
Цветовые метки для брекетов	Полиуретановая акриловая смола, марки: - G-603 (красный); - G-605 (оранжевый); - G-607 (розовый); - G-615 (зеленый); - G-616 (фиолетовый); - G-619 (черный); - G-622 (синий); - G-625 (белый); - G-626 (желтый); - G-632 (голубой).	Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd (Китай)
Дуги TMA	77.8% титан 11.3% молибден	Zhejiang Yahong medical apparatus Co., Ltd (Китай)
Дуги Super Elastic	55% никель 45% титан	Zhejiang Yahong medical apparatus Co., Ltd (Китай)
Дуги Stainless Stell	Нержавеющая сталь марки 304	Zhejiang Yahong medical apparatus Co., Ltd (Китай)
Дуги Thermal Active	Никель-титановый сплав	Zhejiang Yahong medical apparatus Co., Ltd (Китай)
Дуги Cu-niti	Медно-никеливый сплав	Zhejiang Yahong medical apparatus Co., Ltd (Китай)
Дуги Reverse Curve	55% титан 45% Titanuim	Zhejiang Yahong medical apparatus Co., Ltd (Китай)

Наименование	Наименование материалов, марка	Производитель материалов
Упаковка ортодонтических дуг – пластиковые пакеты	Полиэтилен марки PE LD	Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd (Китай)
Упаковка брекетов и щечных трубок – пластиковые коробки	Ударопрочный полистирол – PS HIPS	Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd (Китай)
Упаковка брекетов и щечных трубок – пластиковые зип-пакеты	Полиэтилен марки PE LD	Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd (Китай)

Соответствия цветовых меток расположению и номерам зубов приведено на следующей схеме:

Верхние правые							Верхние левые						
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
G-632	G-632	G-616	G-616	G-615	G-607	G-622	G-622	G-607	G-615	G-616	G-616	G-619	G-619
7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
G-603	G-603	G-603	G-625	G-632	G-605	G-626	G-626	G-605	G-632	G-625	G-603	G-626	G-626
Нижние правые							Нижние левые						

Цветовая маркировка предназначена для идентификации и удаляется в процессе установки брекетов

Сведения о маркировке

Маркировка потребительской упаковки изделий содержит следующую информацию:

- наименование, адрес, торговая марка предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- номер партии и соответствующий символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- дата изготовления и соответствующий символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- срок годности и соответствующий символ по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- наименование и обозначение настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- место производства;
- условия хранения;
- символ «Не использовать при повреждении упаковки»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Не стерильно»;
- символ «Осторожно!»;
- символ «Запрет на повторное применение»;
- комплектация изделия;
- количество изделий в упаковке.

Транспортная тара снабжается этикеткой, на которой указывается:

- наименование, адрес, торговая марка предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- количество упаковок;

- номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- дата упаковки;
- условия хранения;
- символ «Хрупкое, обращаться осторожно»;
- символ «Беречь от влаги».

Перечень применяемых символов

Символ	Описание	Символ	Описание
	Изготовитель		Дата изготовления
	Код партии		Использовать до
	Не использовать при повреждении упаковки		Нестерильно
	Обратитесь к инструкции по применению		Осторожно!
	Запрет на повторное применение		Беречь от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно	-	-

Сведения об упаковке медицинского изделия

Изделия упакованы в потребительскую тару – пластиковые пакеты, зип-пакеты и пластиковые коробки.

Упаковка обеспечивает механическую защиту изделий от повреждений при хранении и транспортировании в соответствии с настоящими техническими условиями.

Для транспортирования внешние изделия в групповой таре уложены в транспортную тару – коробки изготовленные из картона. Свободное пространство внутри групповой тары заполнено уплотнительным материалом, предотвращающим все перемещения внутри транспортной тары. Упакованная коробка оклеена полиэтиленовой лентой с липким слоем.

Сведения о совместимых медицинских изделиях

Изделие совместимо с другими ортодонтическими изделиями для того, чтобы осуществить коррекцию. Врачи в процессе лечения в зависимости от конкретной ситуации используют различные ортодонтические материалы.

Очистка, дезинфекция и стерилизация

Изделия поставляются нестерильными. Для одноразового использования.

Изделия берутся только пинцетами и перед установкой помещаются для дезинфекции в 75%-ный спиртовой раствор на 20-30 минут.

Порядок и условия утилизации

Изделие, загрязненное кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, относящимися к медицинским отходам класса Б. В случае окончания срока годности или при поврежденной упаковке утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

Срок службы

Срок службы составляет 3 года после того, как продукт зафиксирован в полости рта пациента при использовании в нормальных условиях

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок хранения брекетов – 5 лет.

Срок эксплуатации изделия в ротовой полости пациента не более 3 лет.

Перечень применяемых стандартов

Нормативный документ	Название нормативного документа
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования

Приложение А

Массогабаритные характеристики

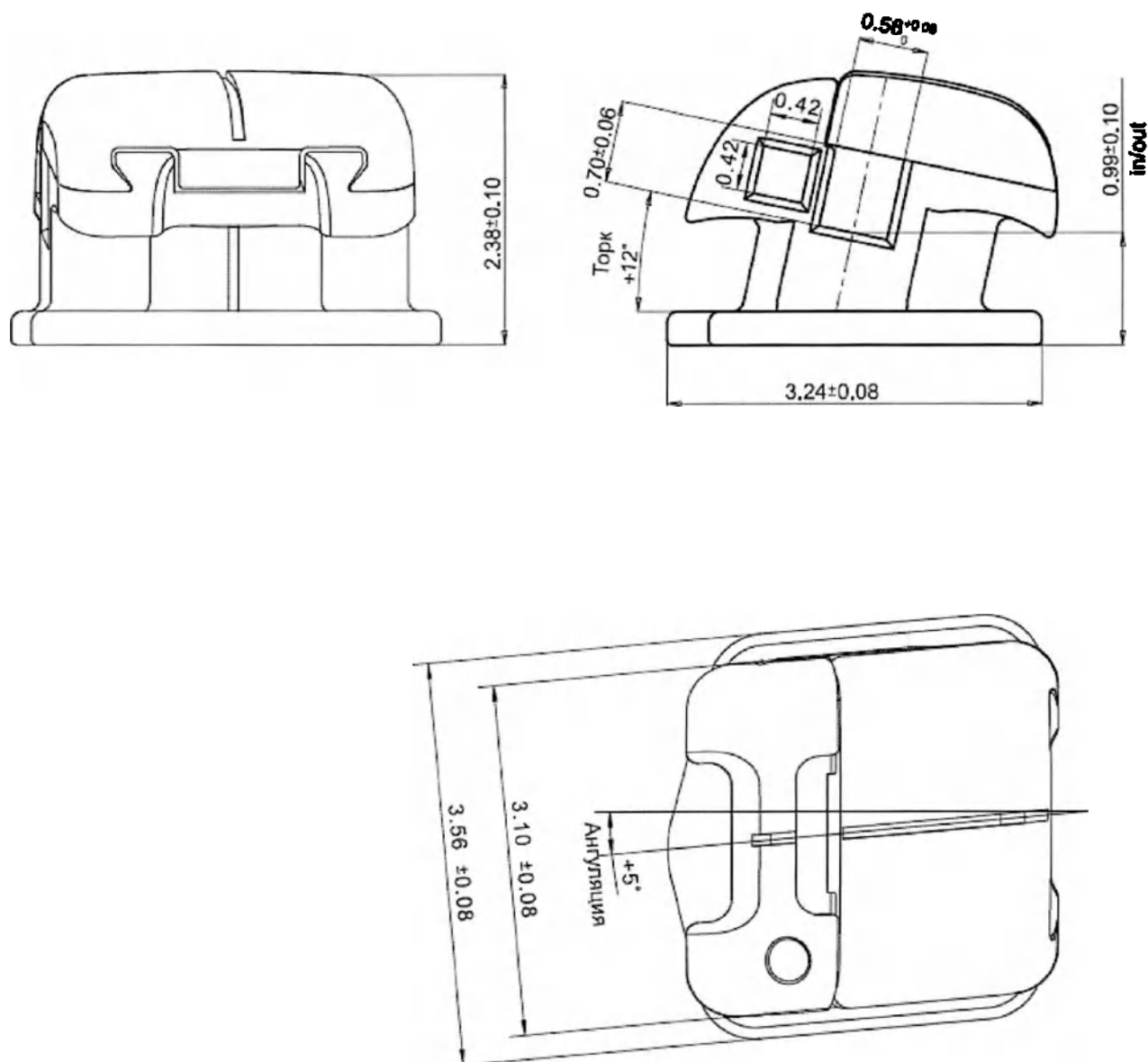


Рисунок 1. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 11 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-112(11)	+12	+5	0,090

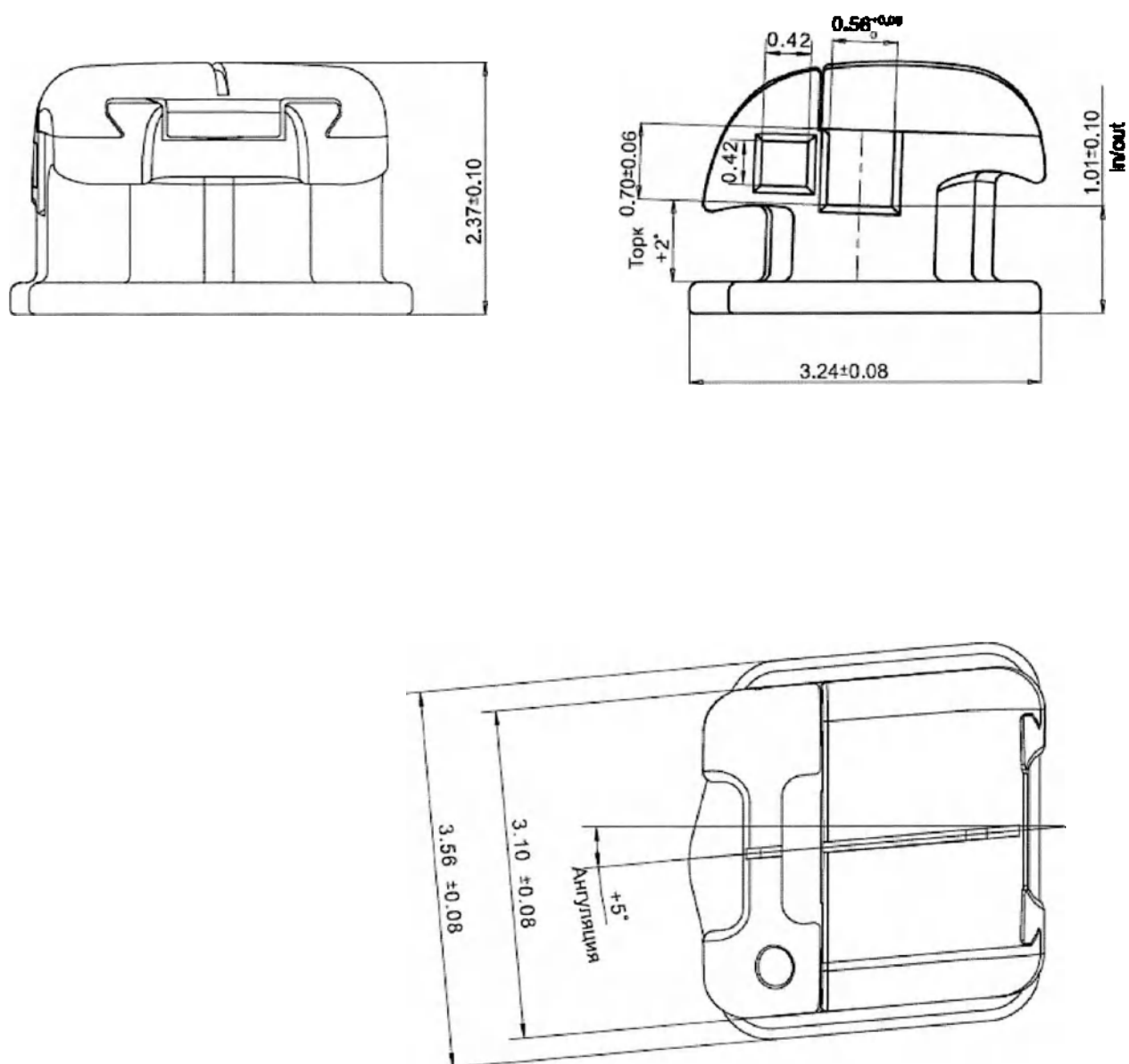


Рисунок 2. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 11 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-112(11)	+12	+5	0,090

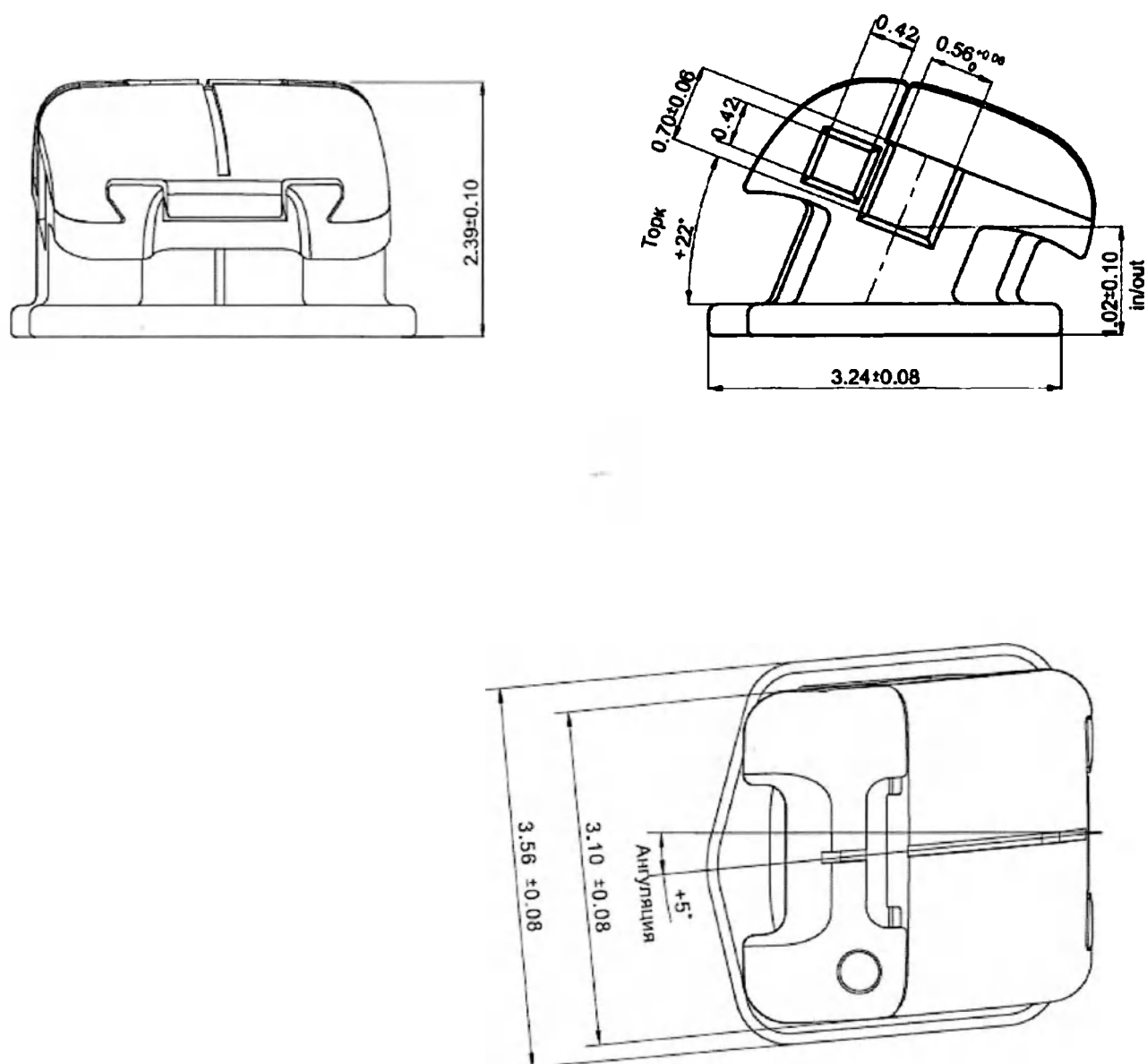


Рисунок 3. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 11 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-113(11)	+22	+5	0,090

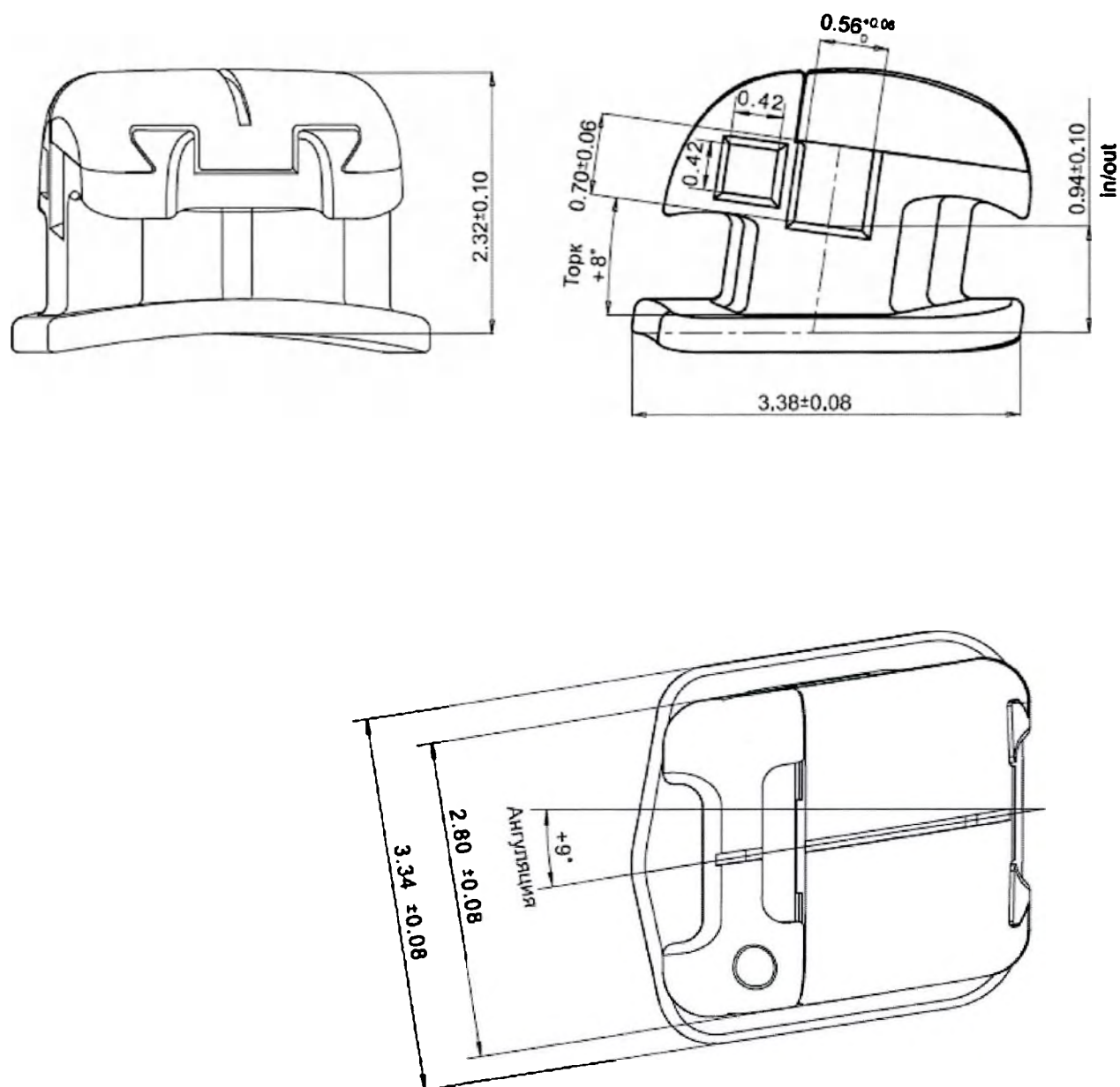


Рисунок 4. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 12 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-122(12)	+8	+9	0,090

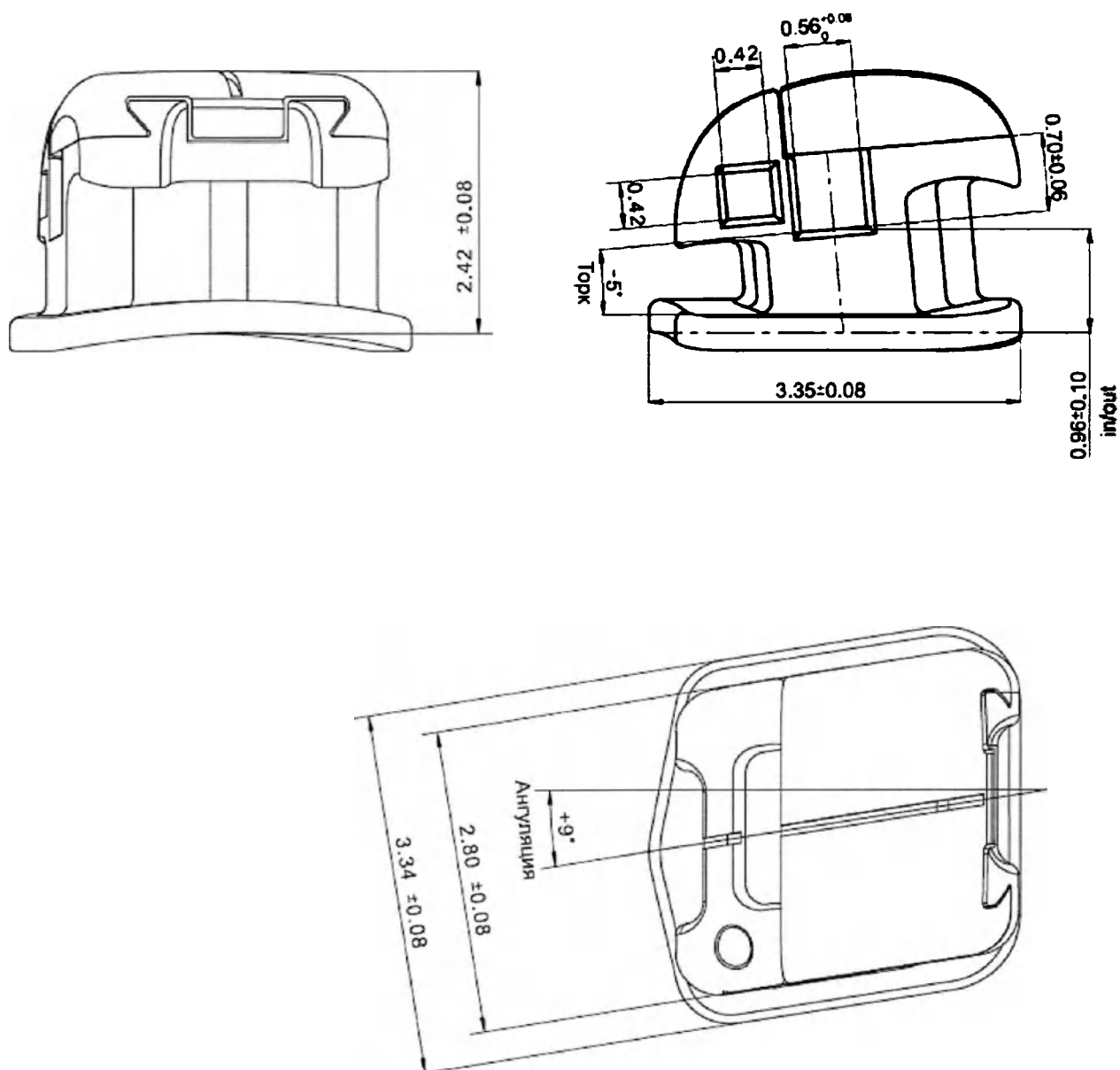


Рисунок 5. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 12 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-121(12)	-5	+9	0,090

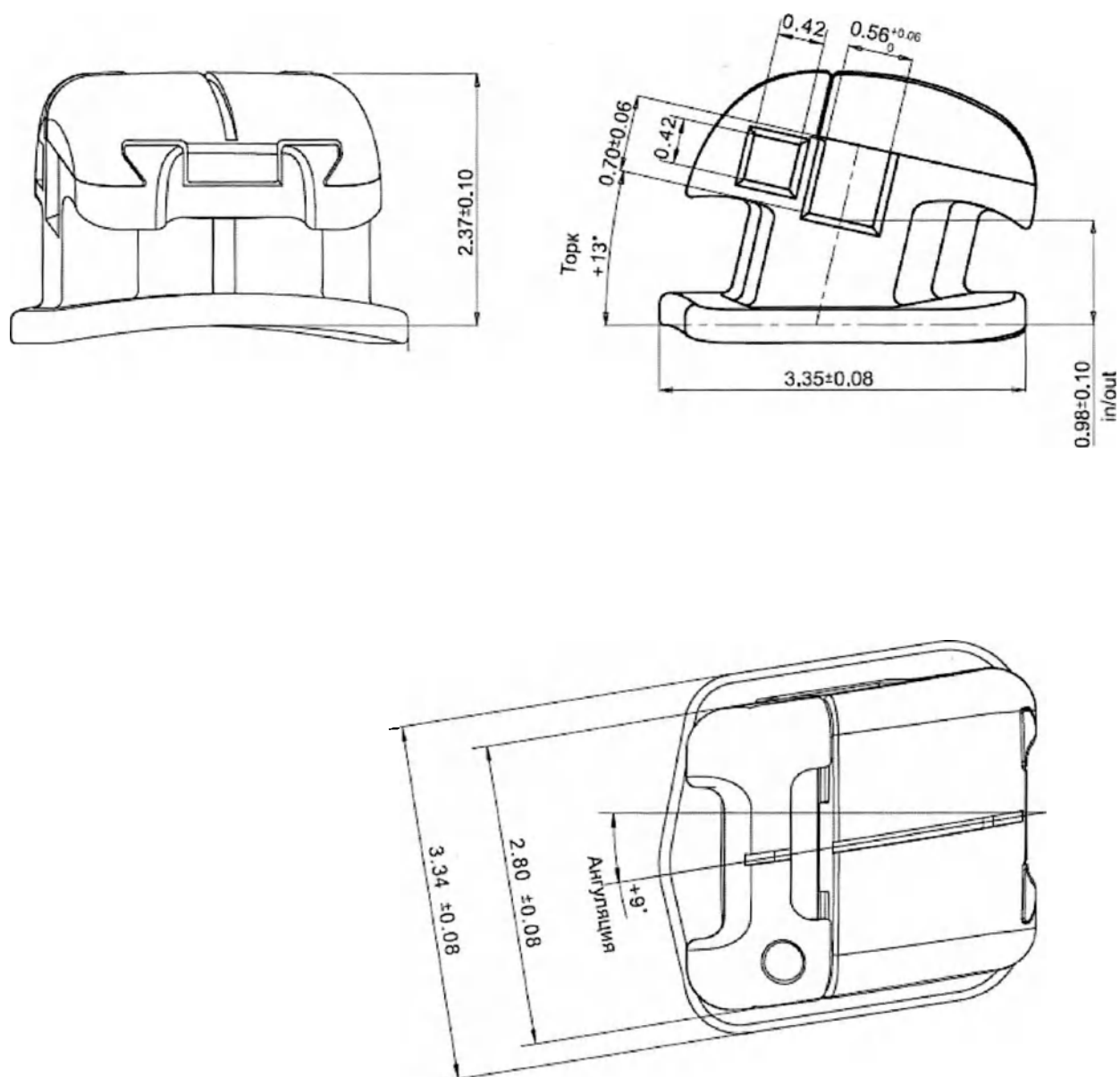


Рисунок 6. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 12 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-123(12)	+13	+9	0,090

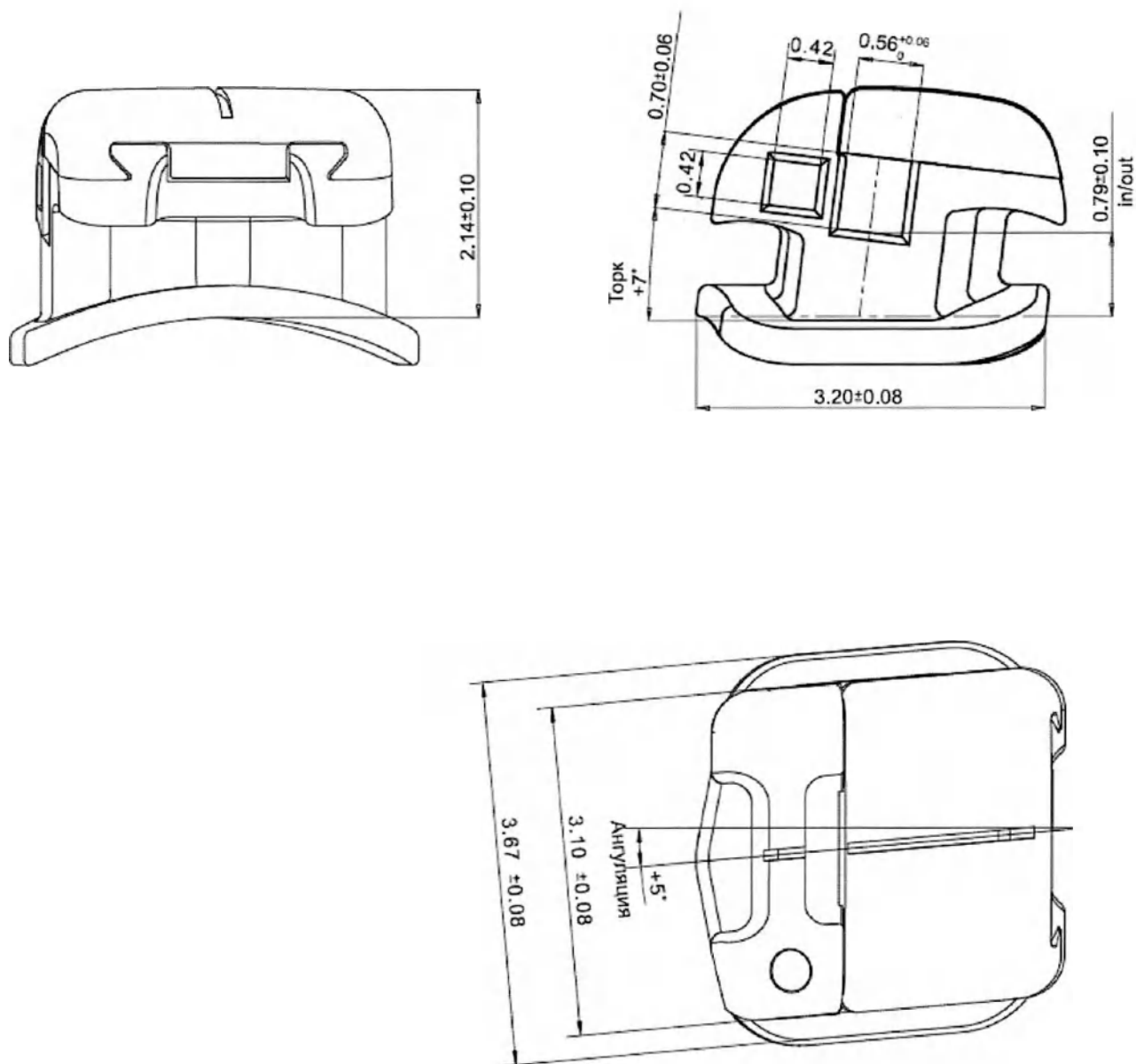


Рисунок 7. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 13 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-132(13)	+7	+5	0,090

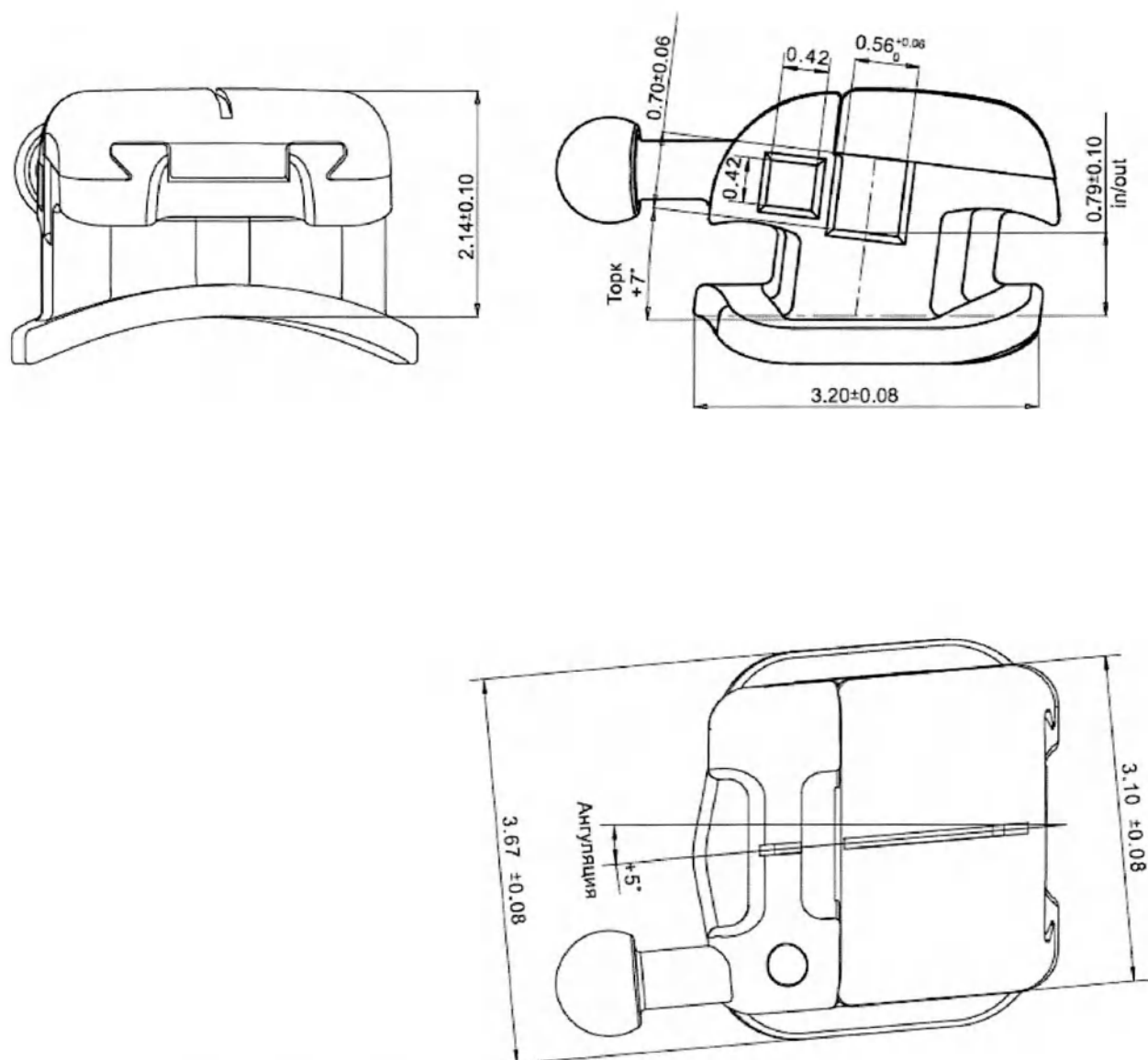


Рисунок 8. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 13 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-132(13)	+7	+5	0,095

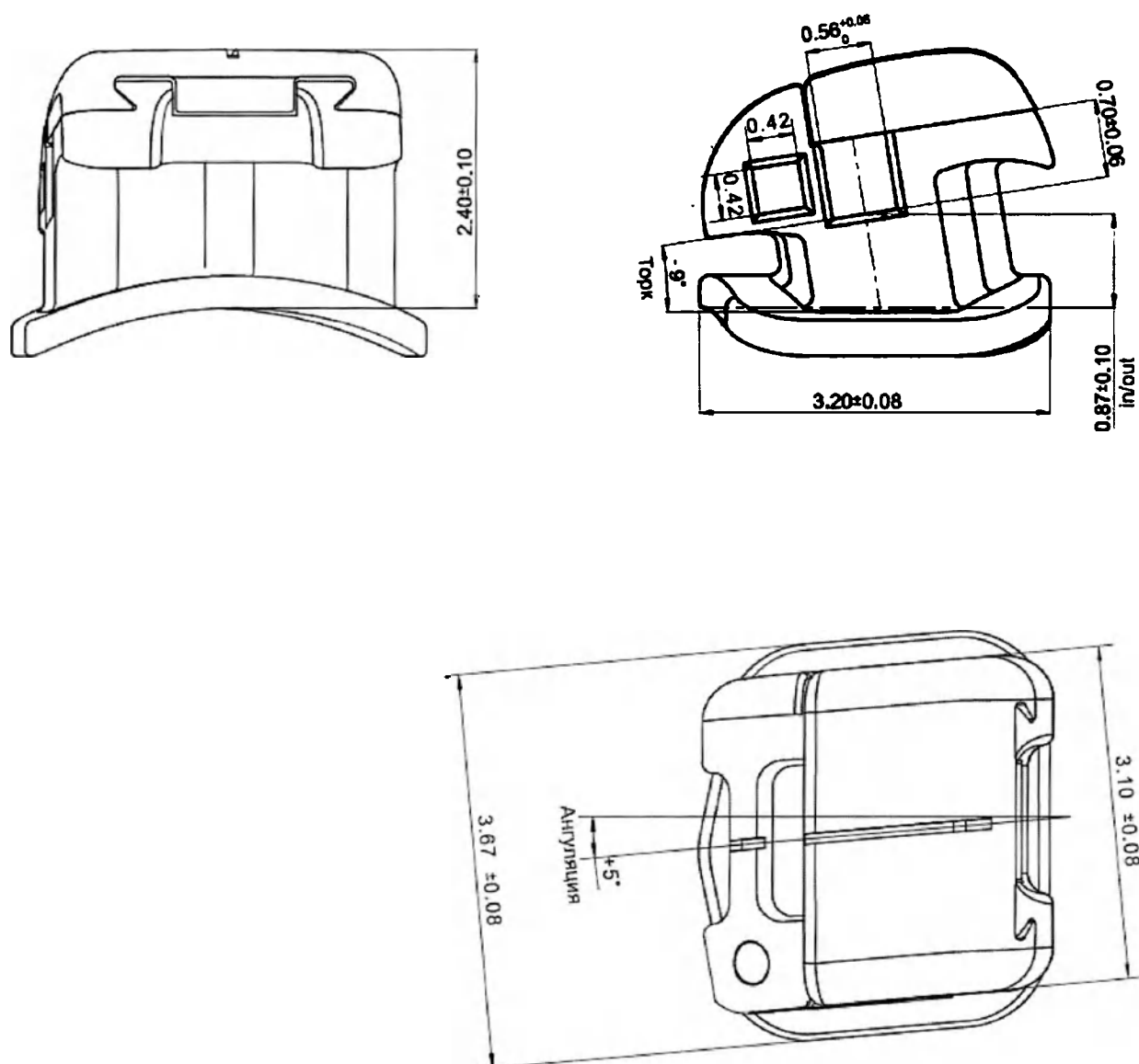


Рисунок 9. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 13 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-131(13)	-9	+5	0,090

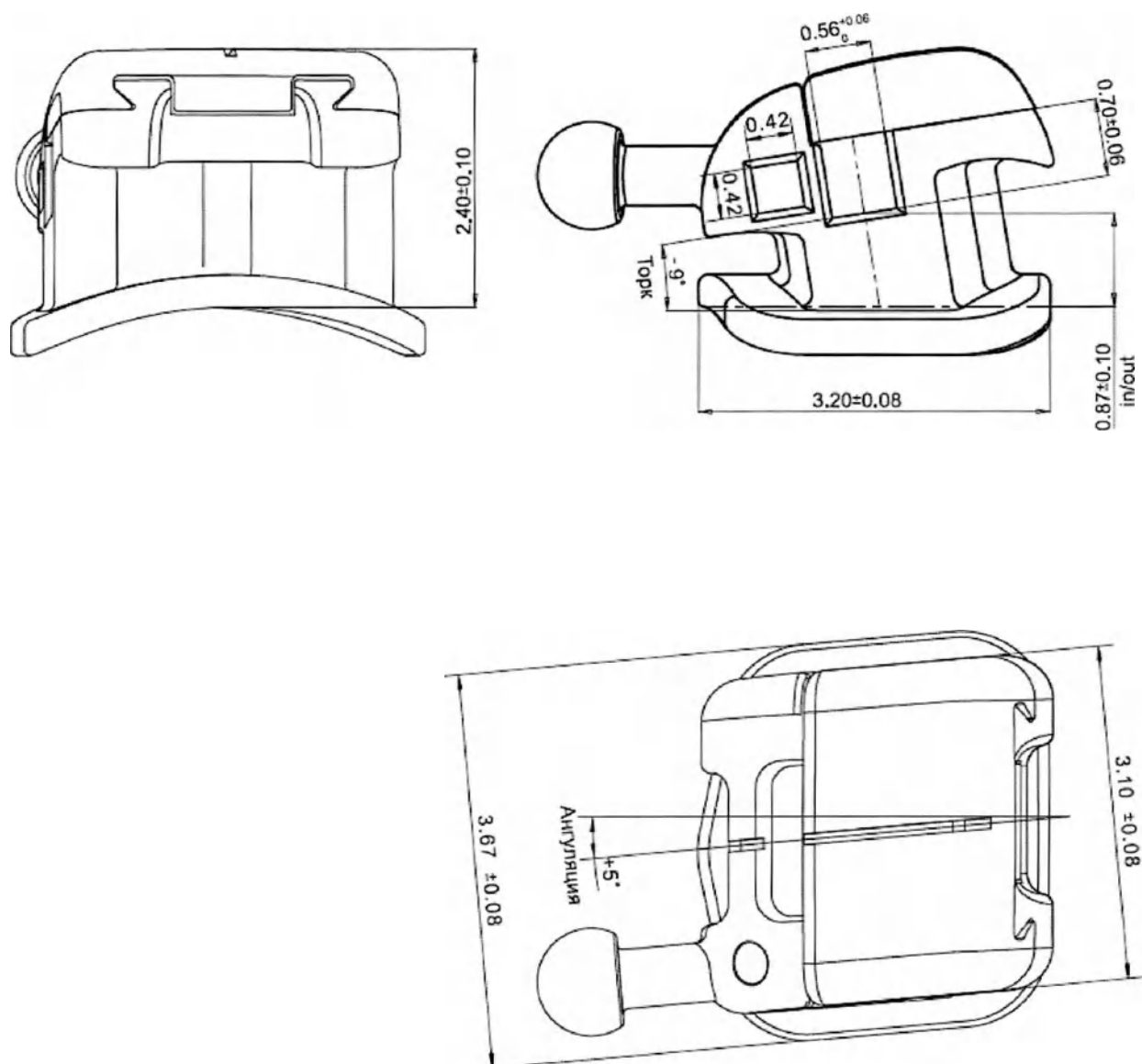


Рисунок 10. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 13 зуб, с крючком, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-131(13)	-9	+5	0,095

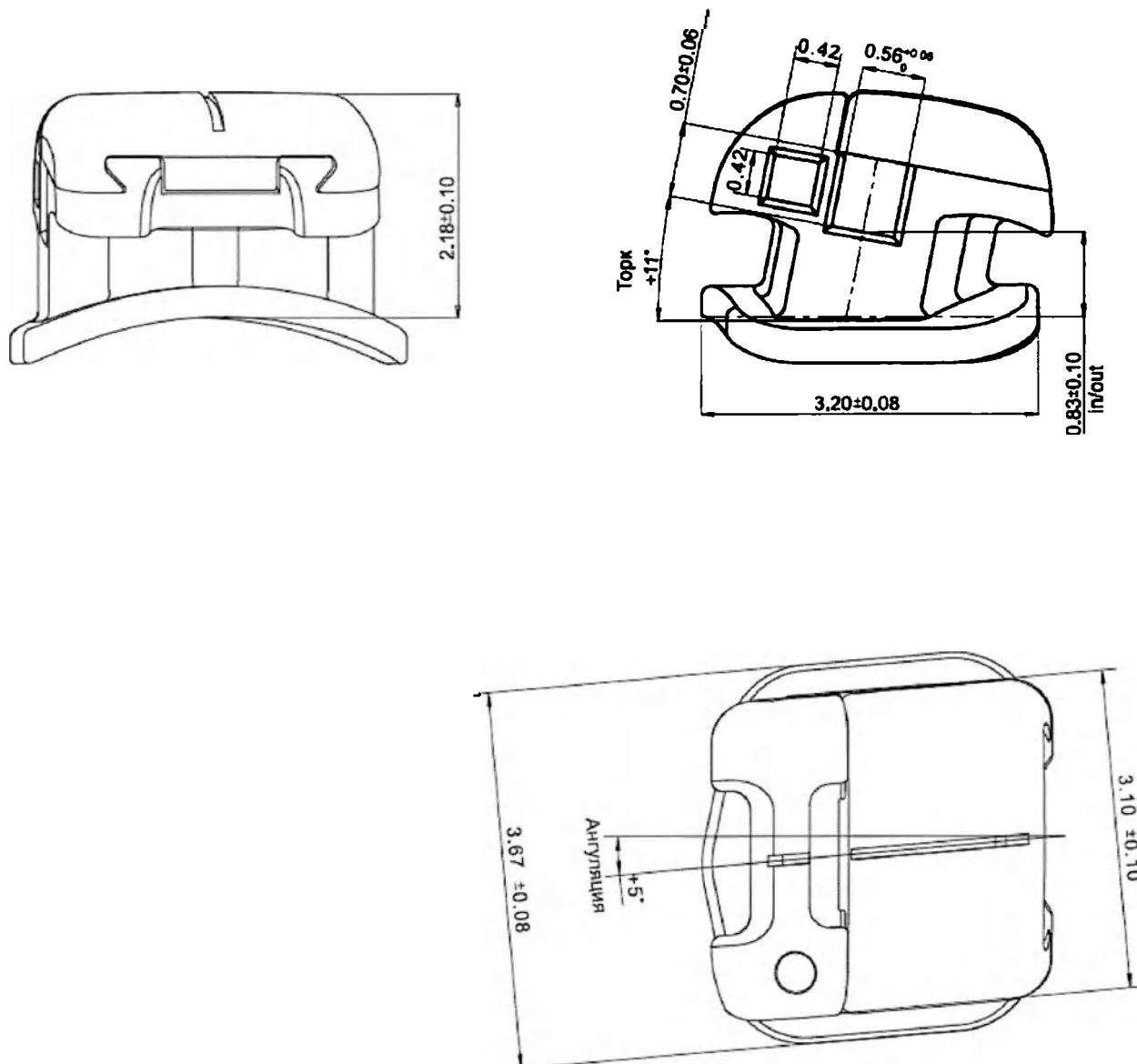


Рисунок 11. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 13 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-133(13)	+11	+5	0,090

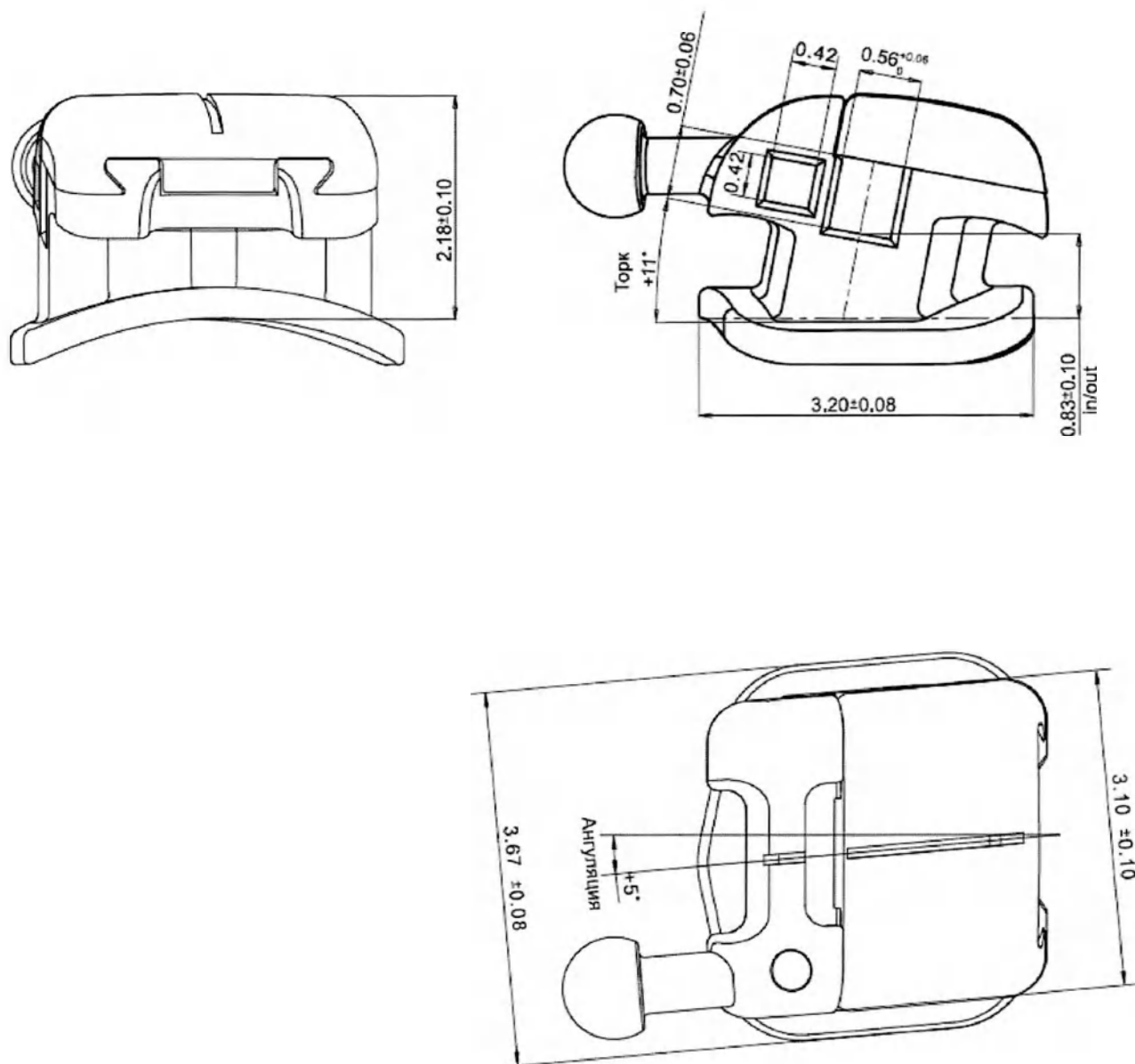


Рисунок 12. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 13 зуб, с крючком, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-133(13)	+11	+5	0,095

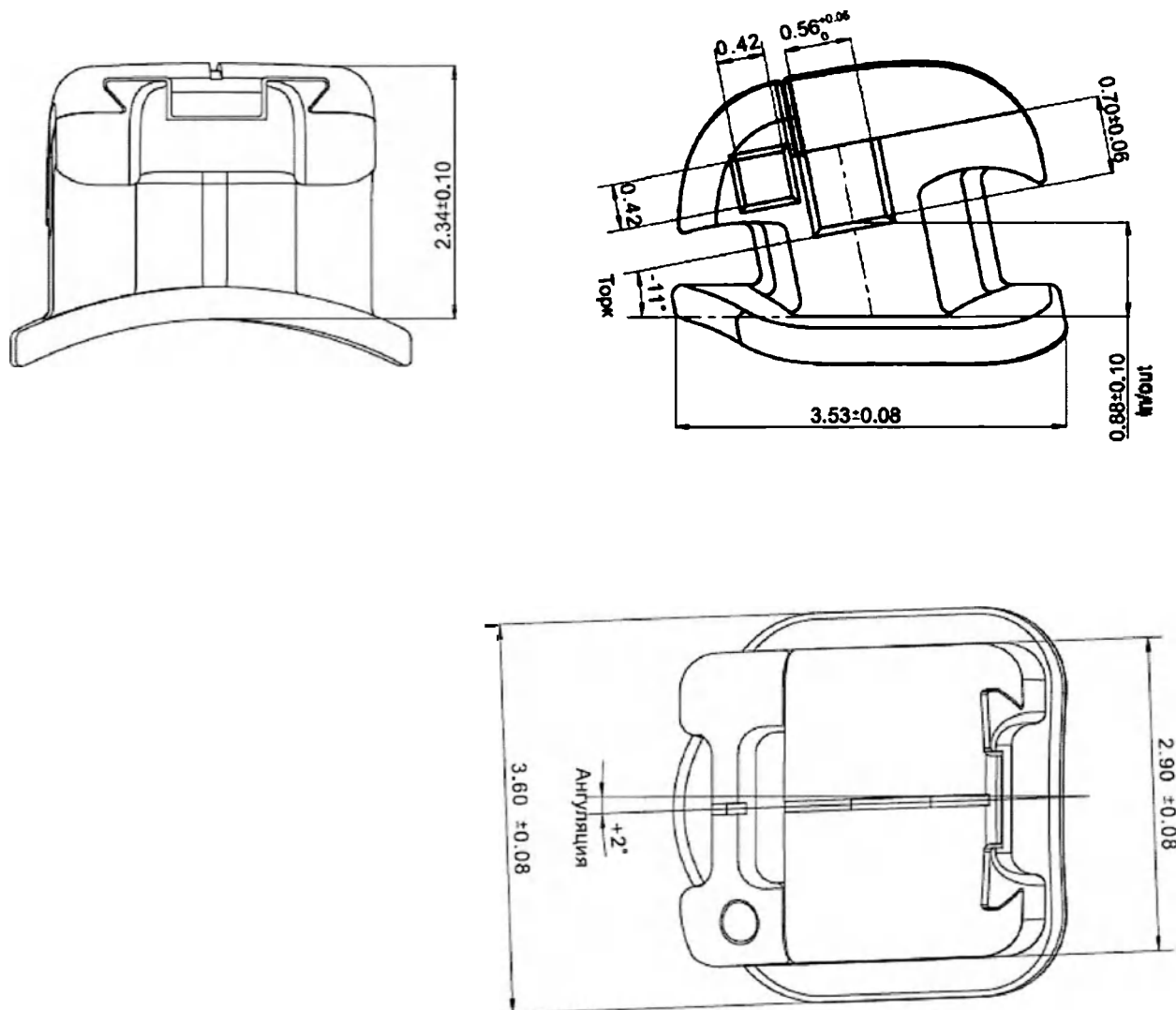


Рисунок 13. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 14 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-142(14)	-11	+2	0,090

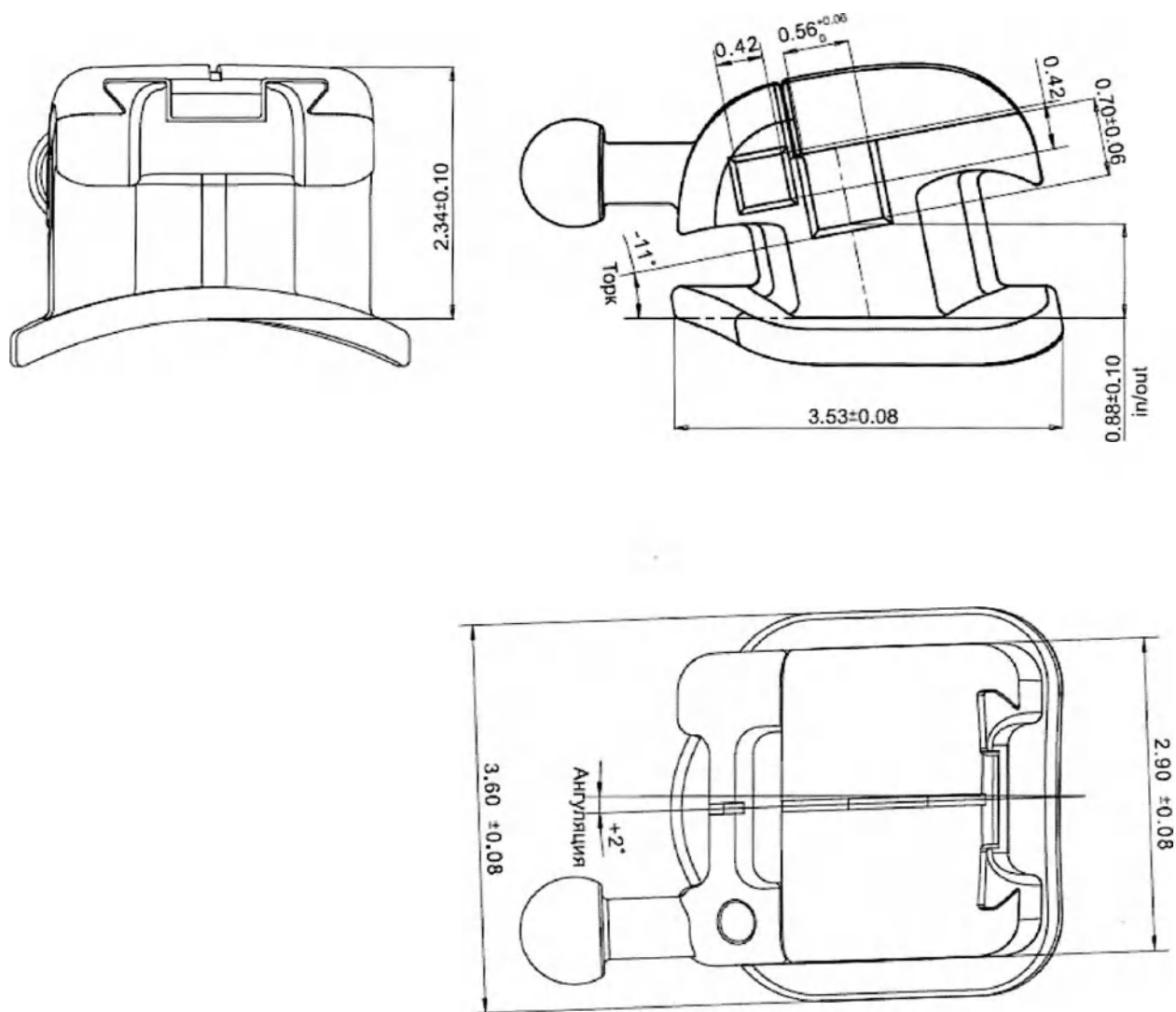


Рисунок 14. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 14 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-142(14)	-11	+2	0,095

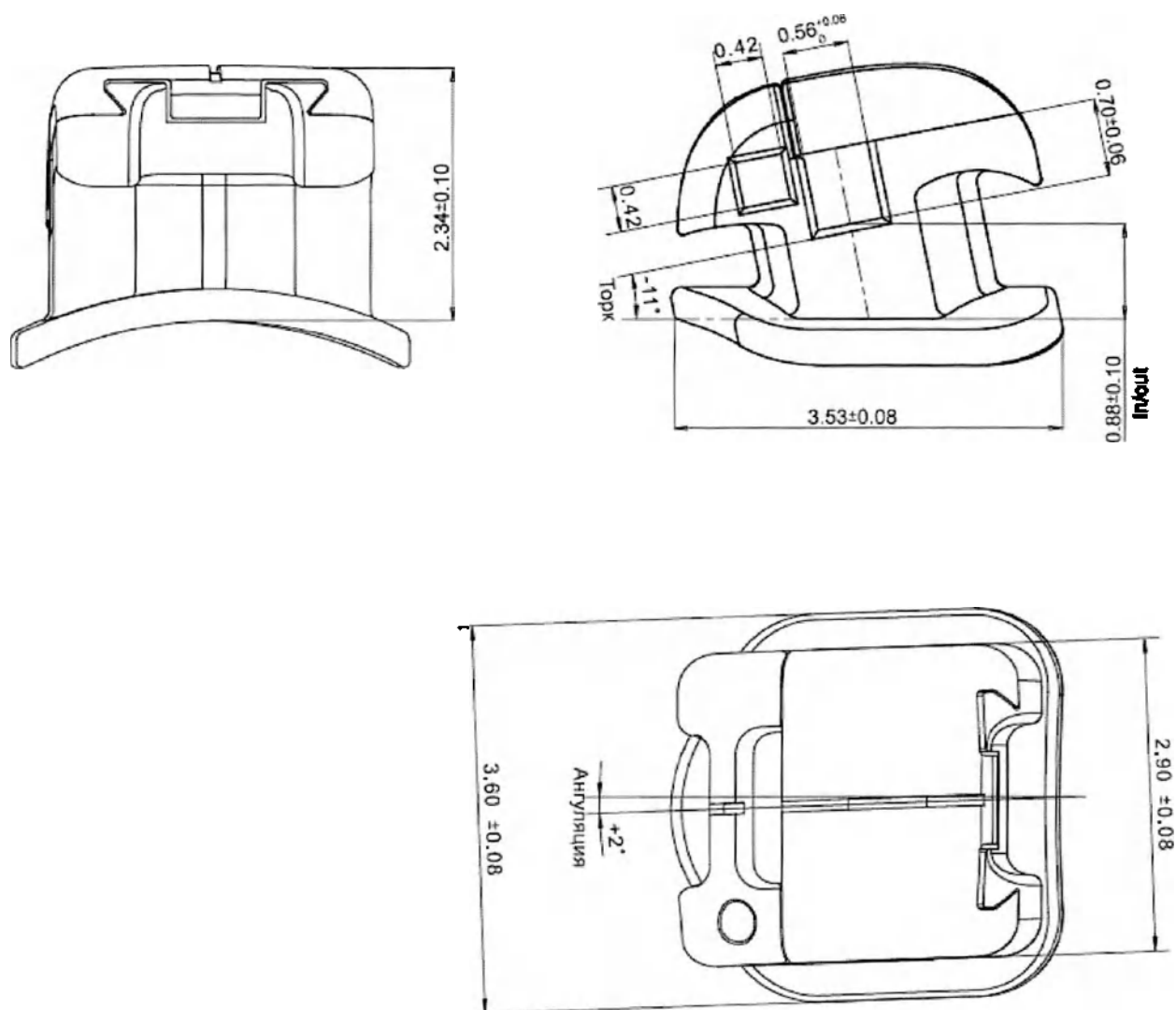


Рисунок 15. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 15 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-152(15)	-11	+2	0,090

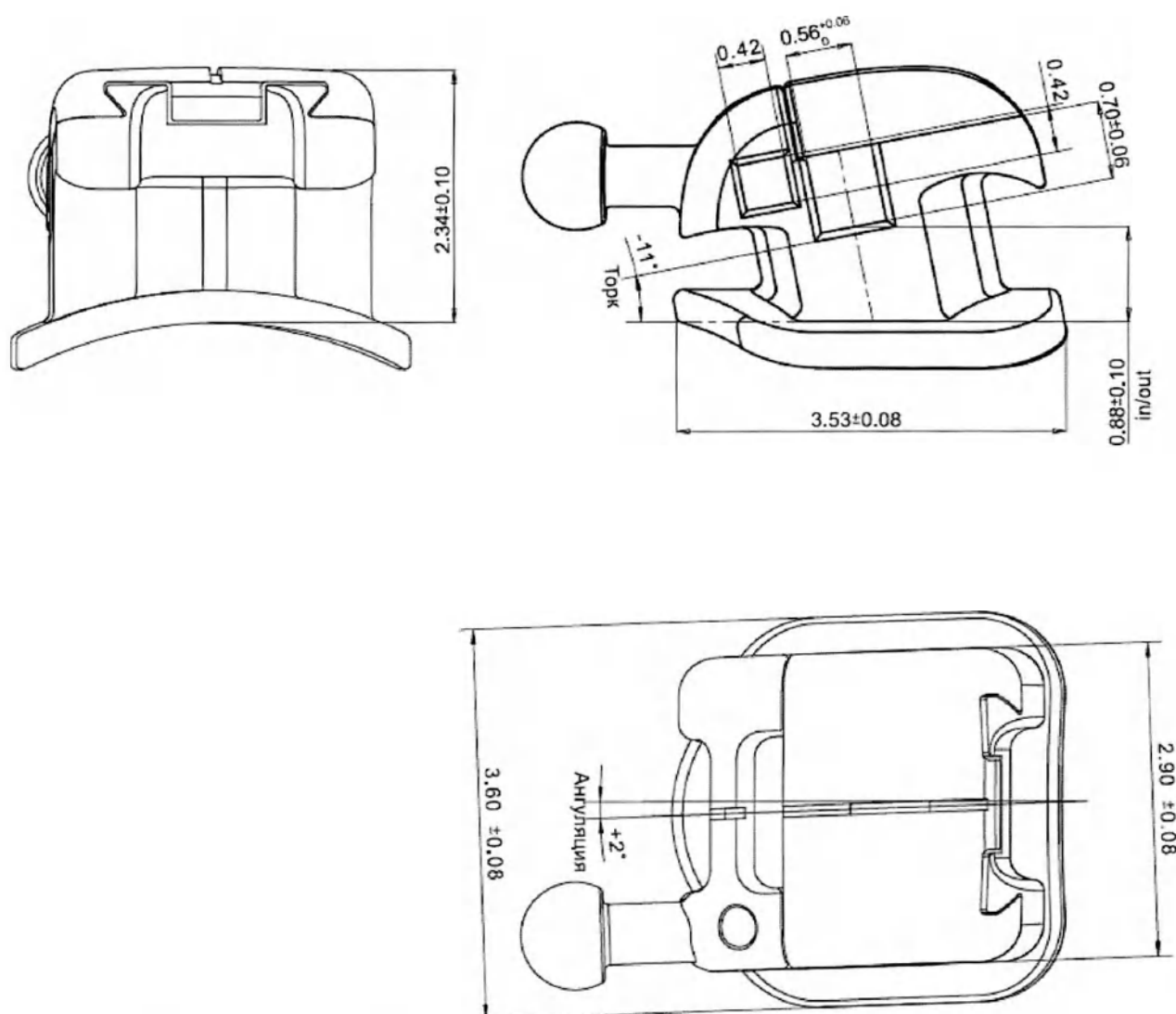


Рисунок 16. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 15 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-152(15)	-11	+2	0,095

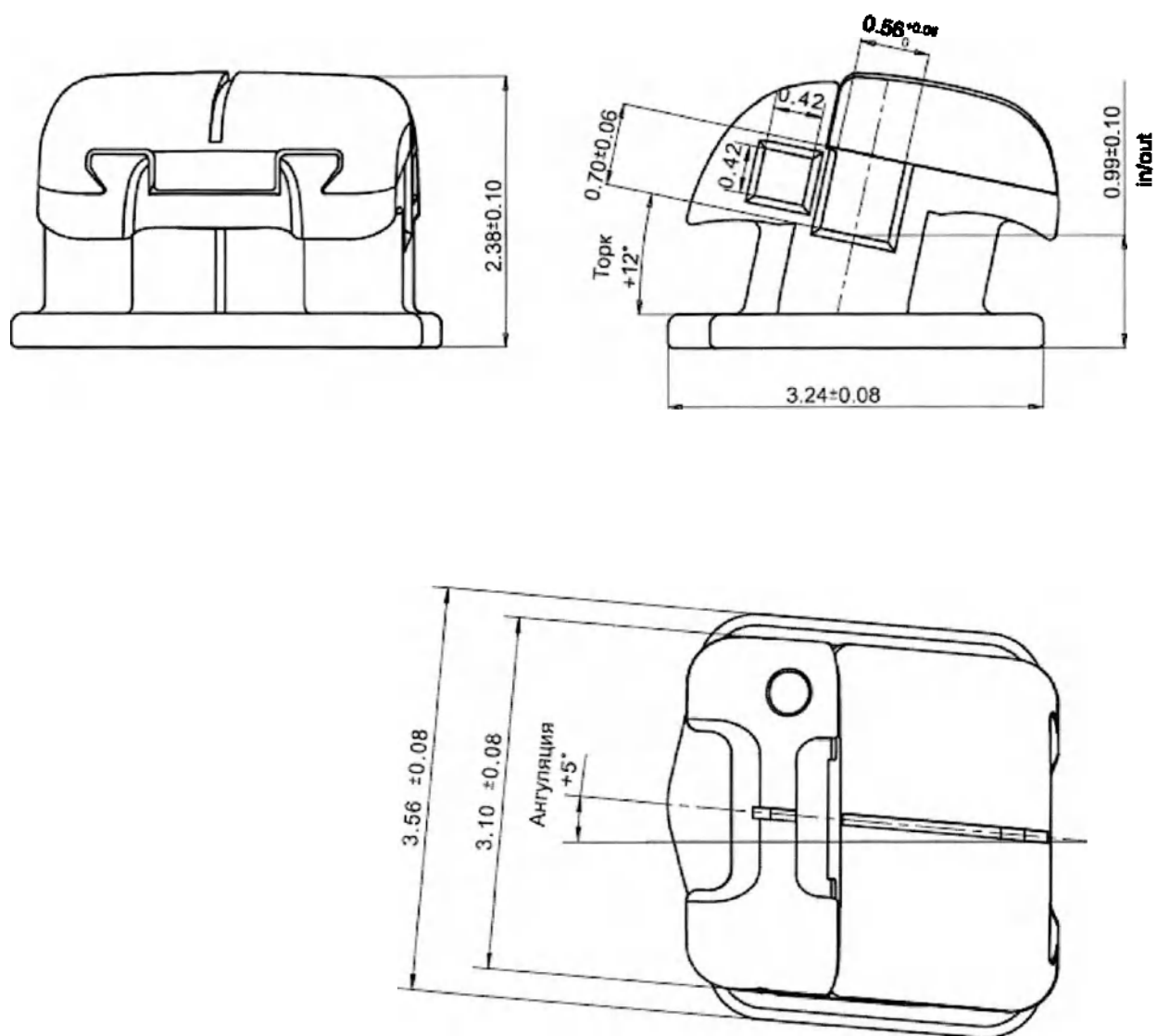


Рисунок 17. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 21 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-212(21)	+12	+5	0,090

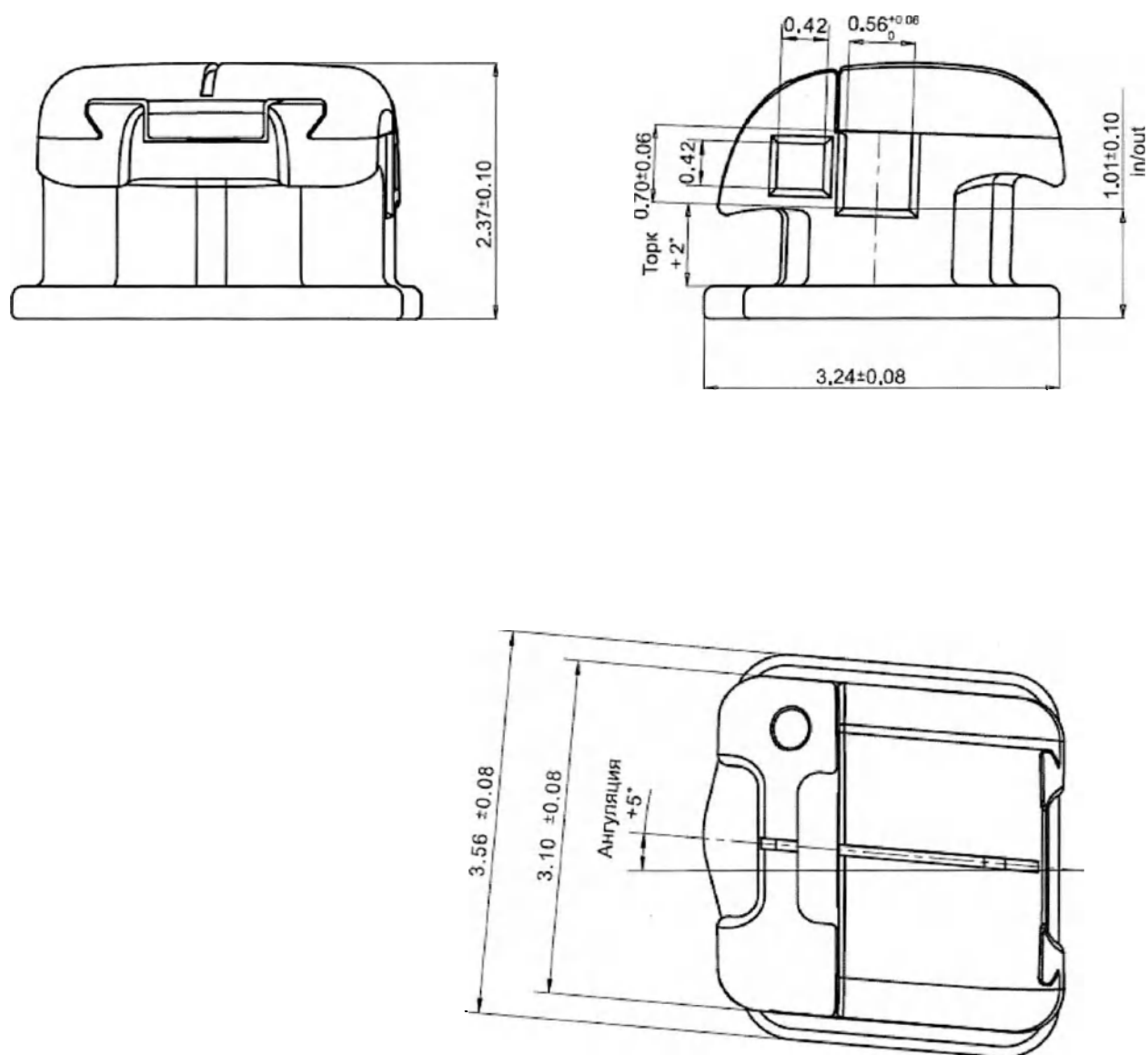


Рисунок 18. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 21 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-211(21)	+2	+5	0,090

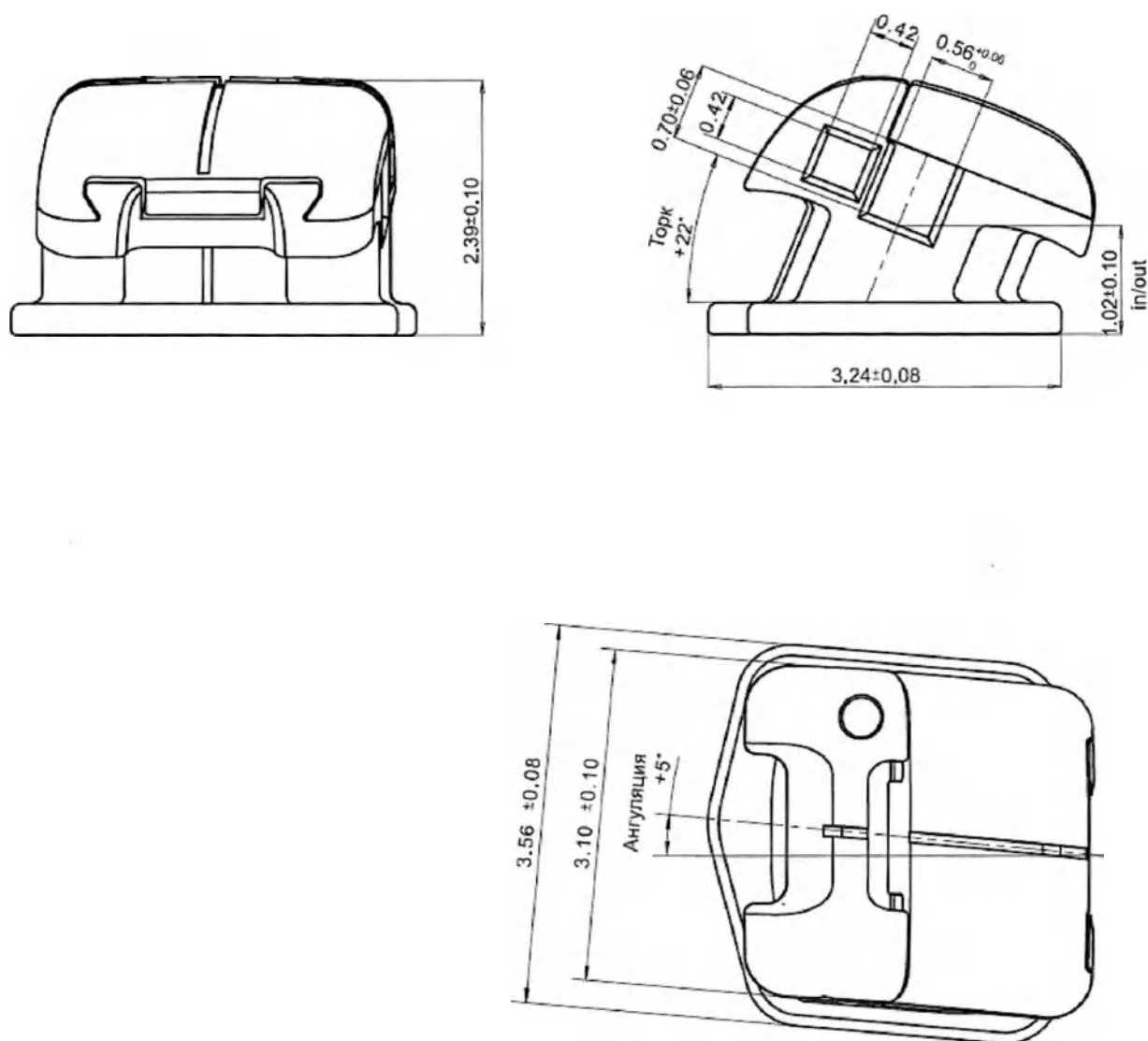


Рисунок 19. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 21 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-213(21)	+22	+5	0,090

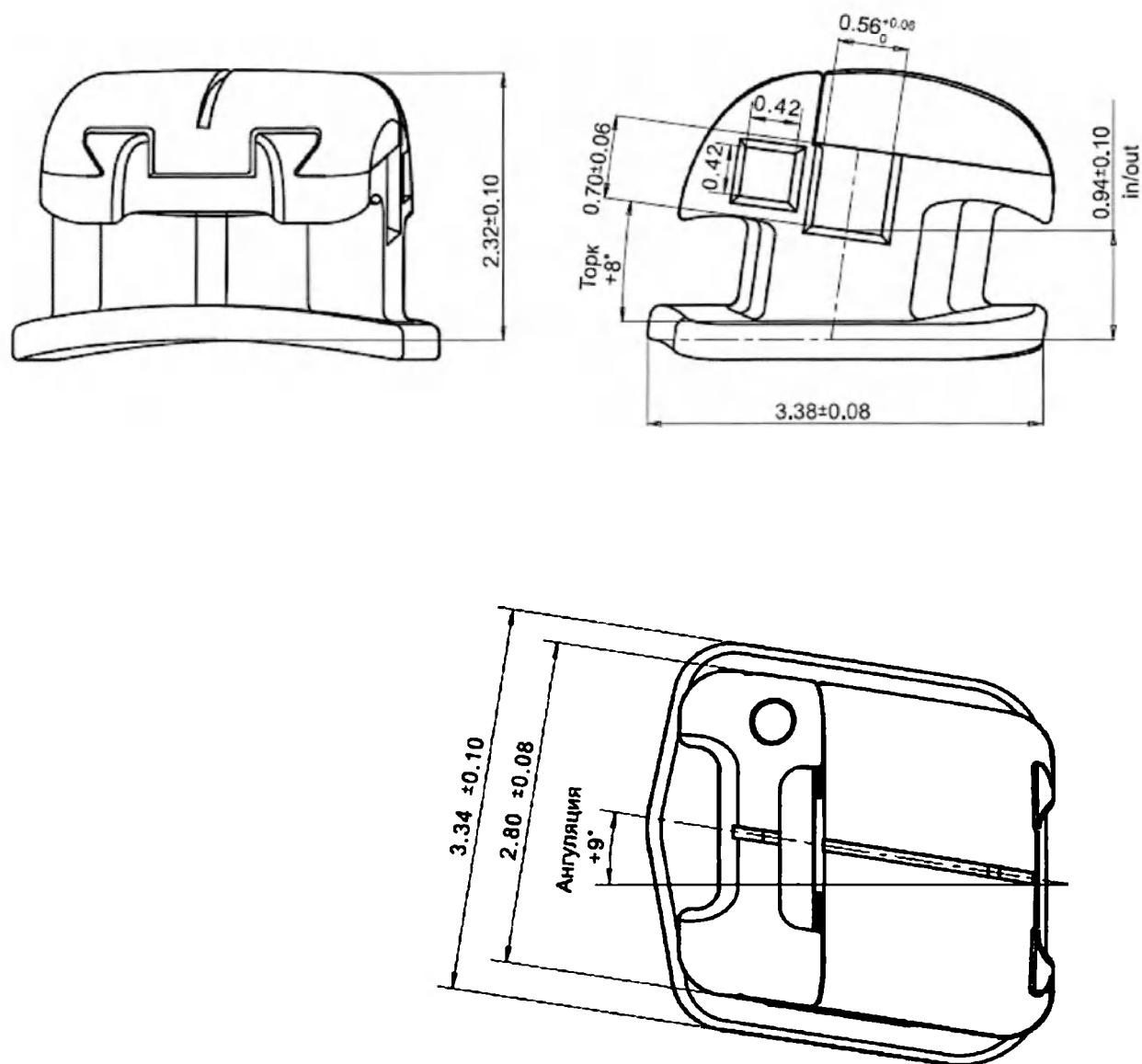


Рисунок 20. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 22 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-222(22)	+8	+9	0,090

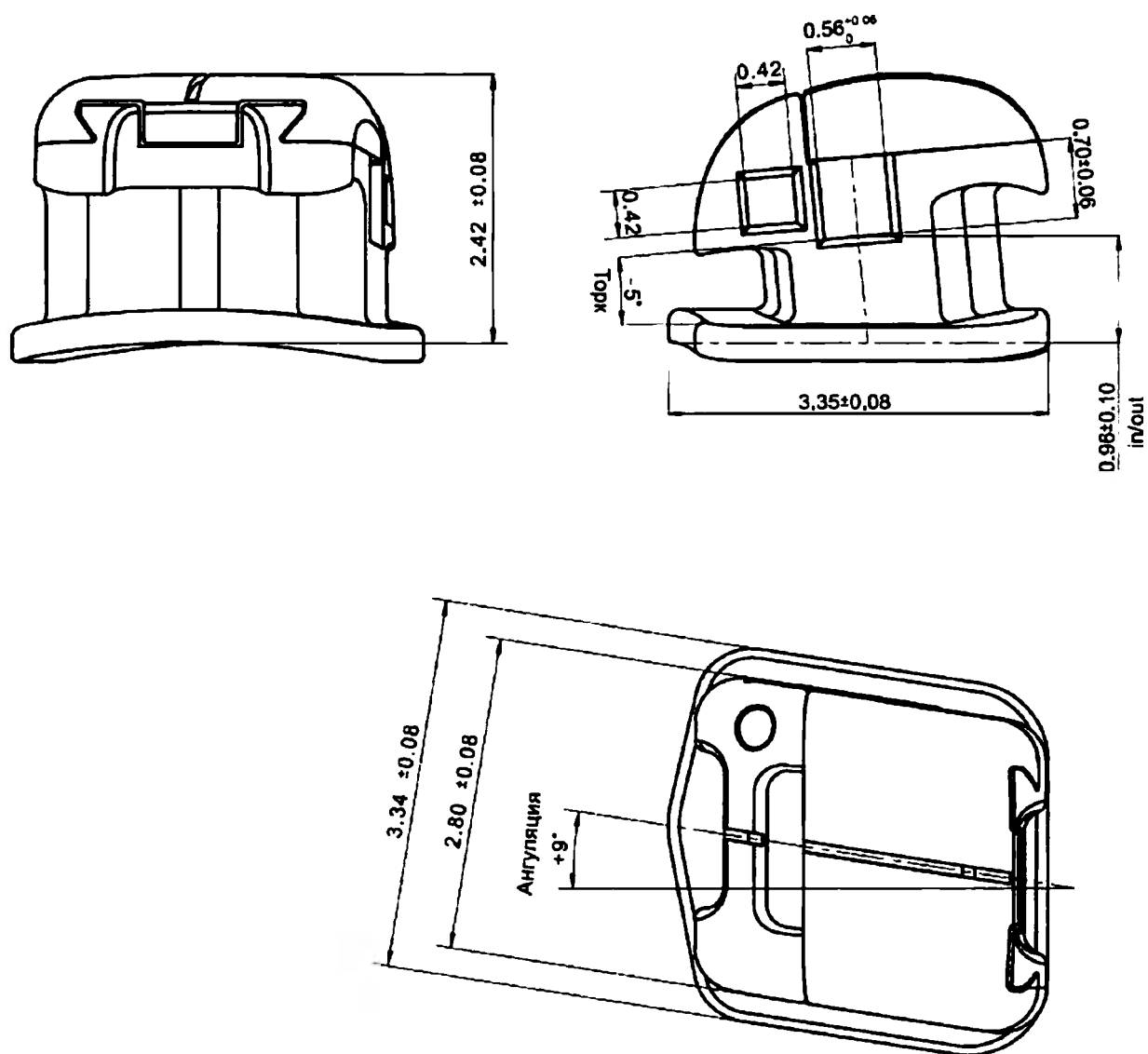


Рисунок 21. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 22 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-221(22)	-5	+9	0,090

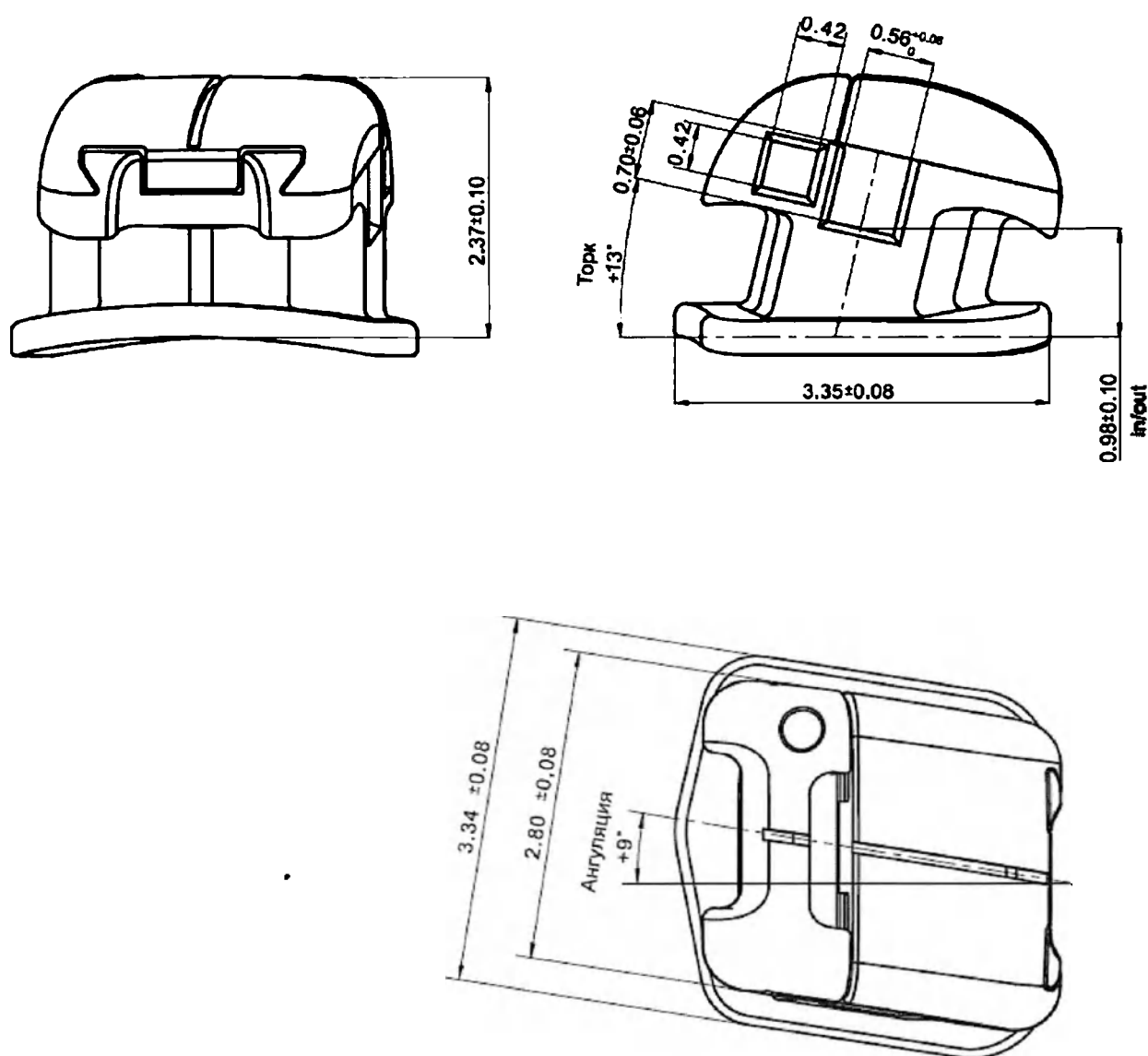


Рисунок 22. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 22 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-223(22)	+13	+9	0,090

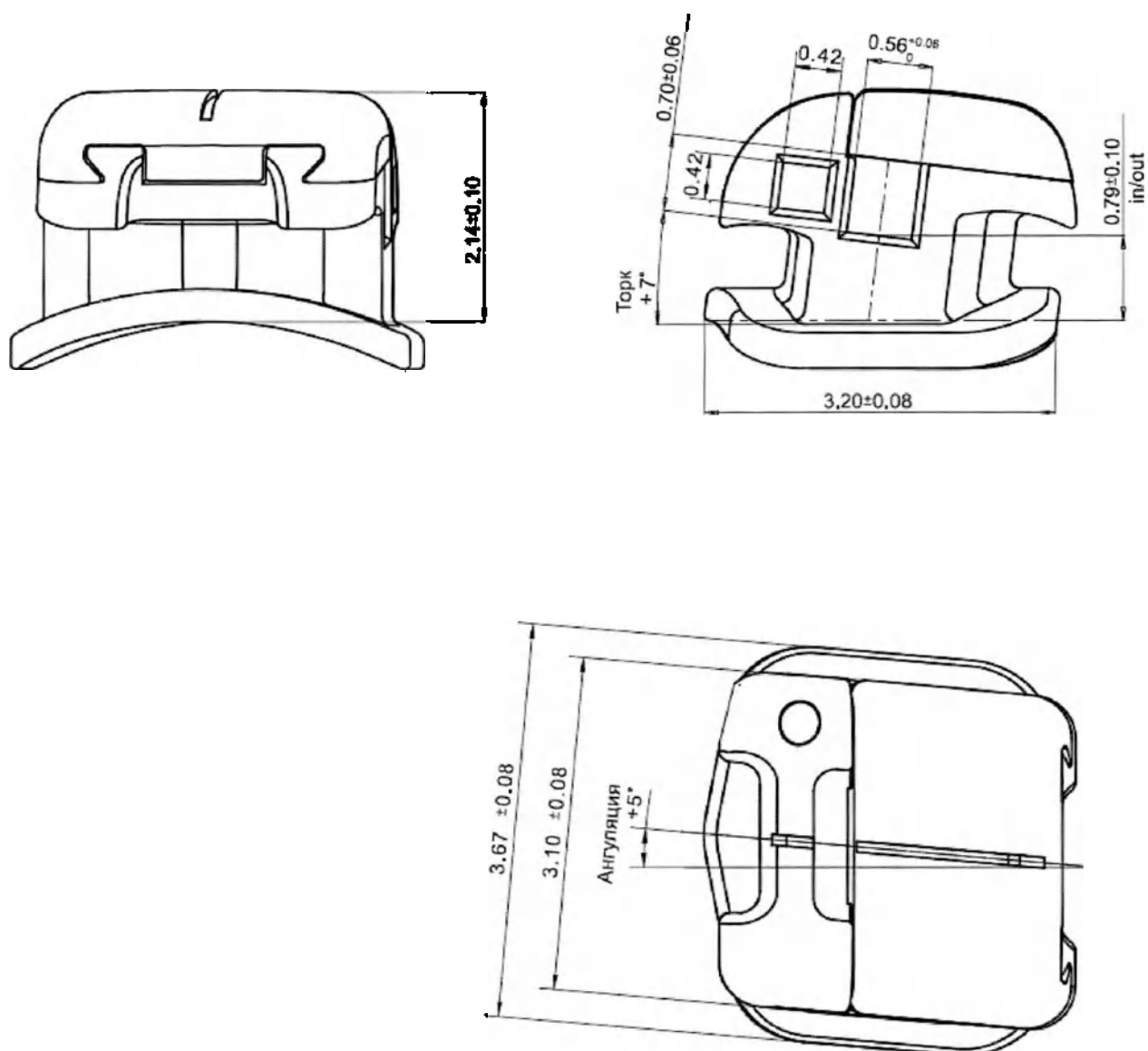


Рисунок 23. Брекеты металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 23 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-232(23)	+7	+5	0,090

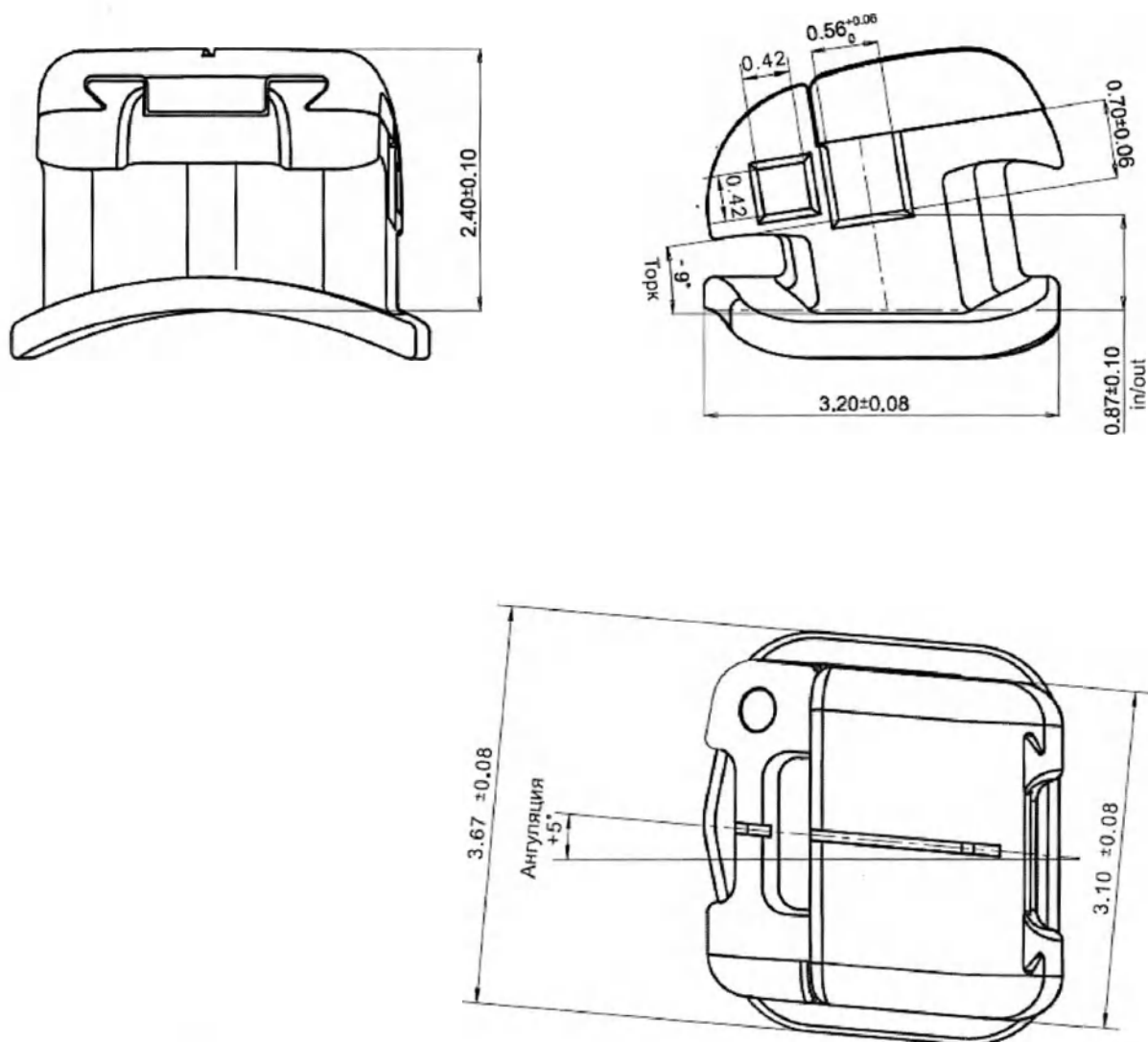


Рисунок 24. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 23 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-231(23)	-9	+5	0,090

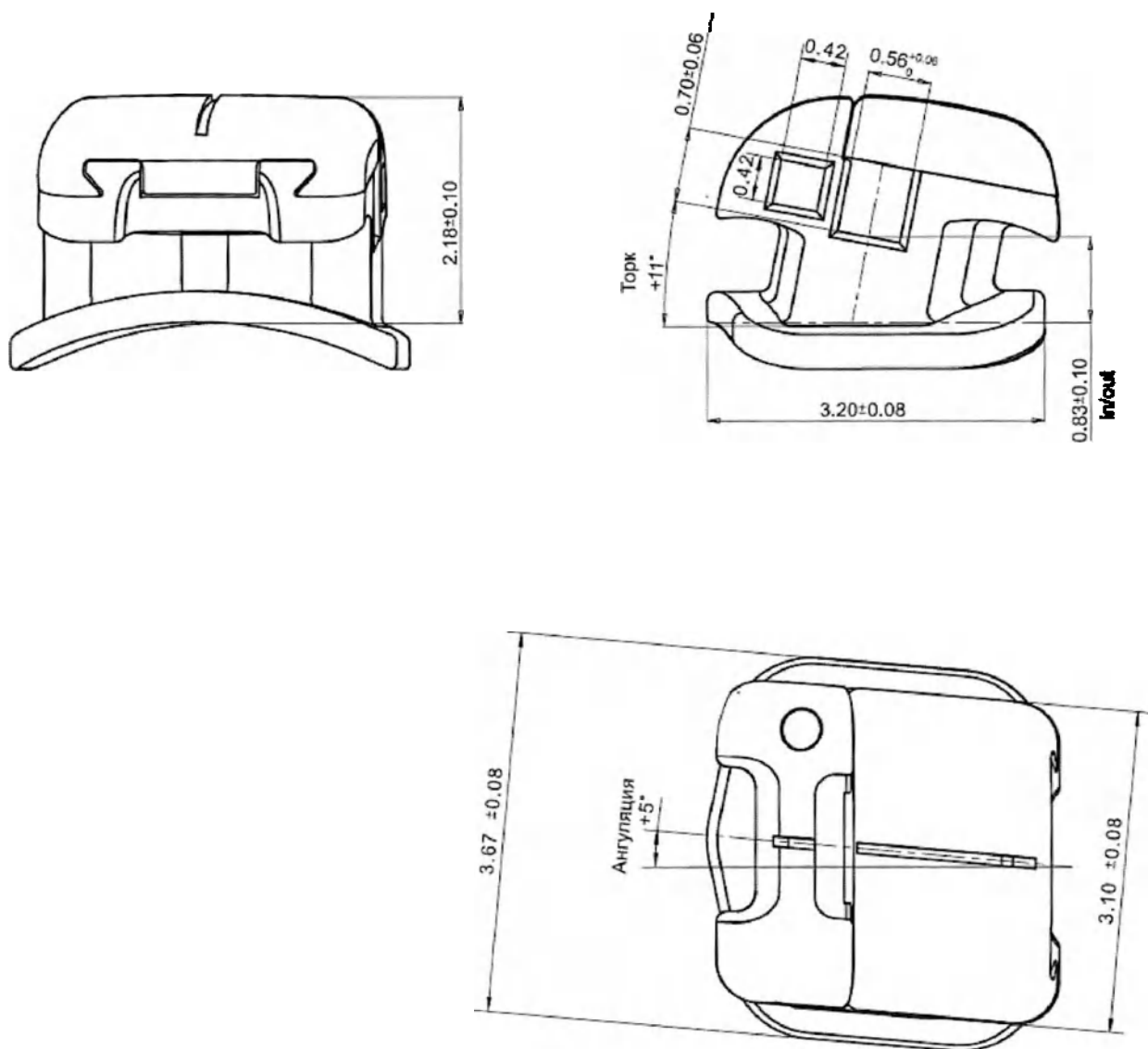


Рисунок 25. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 23 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-233(23)	+11	+5	0,090

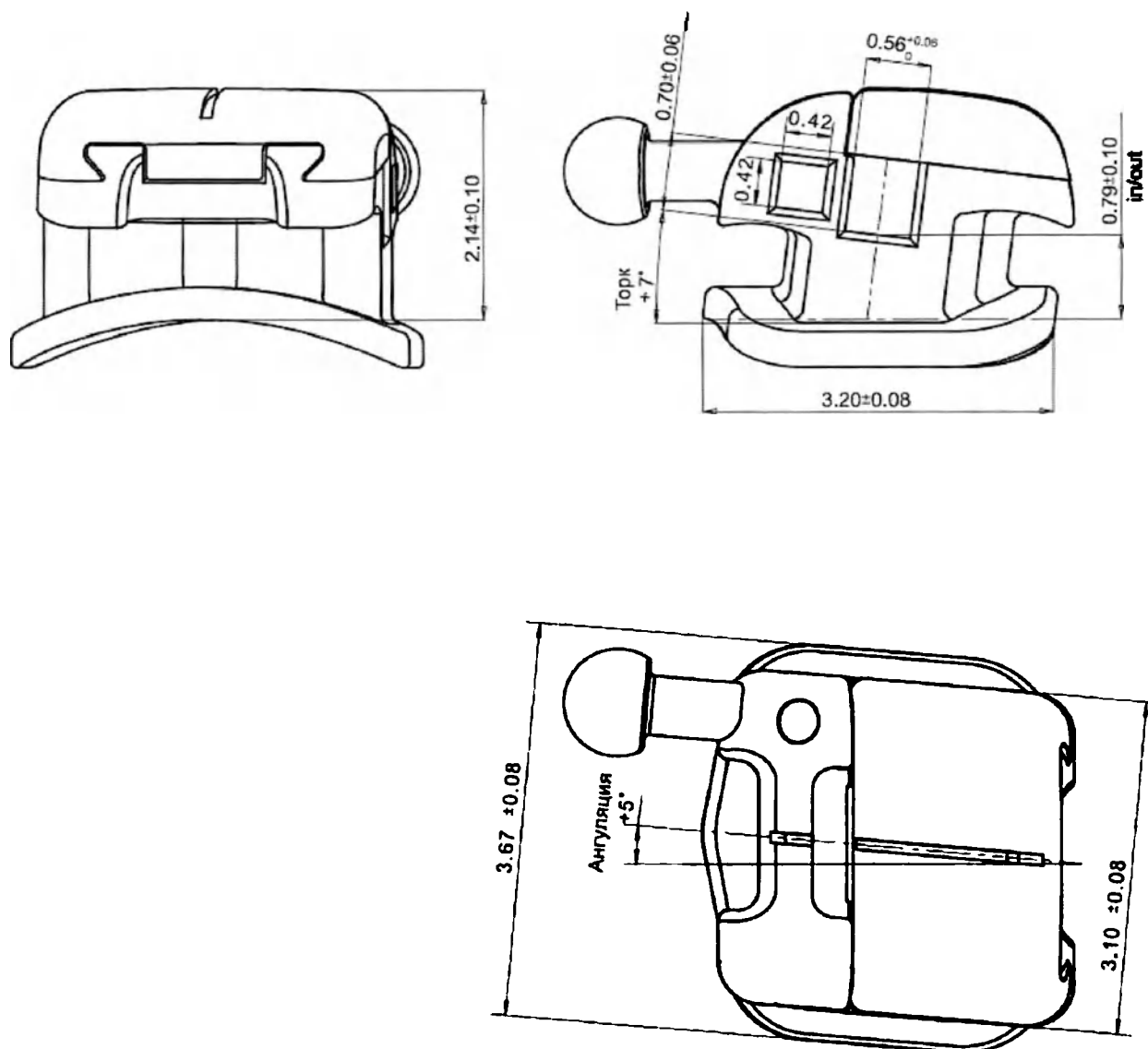


Рисунок 26. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 23 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-232(23)	+7	+5	0,095

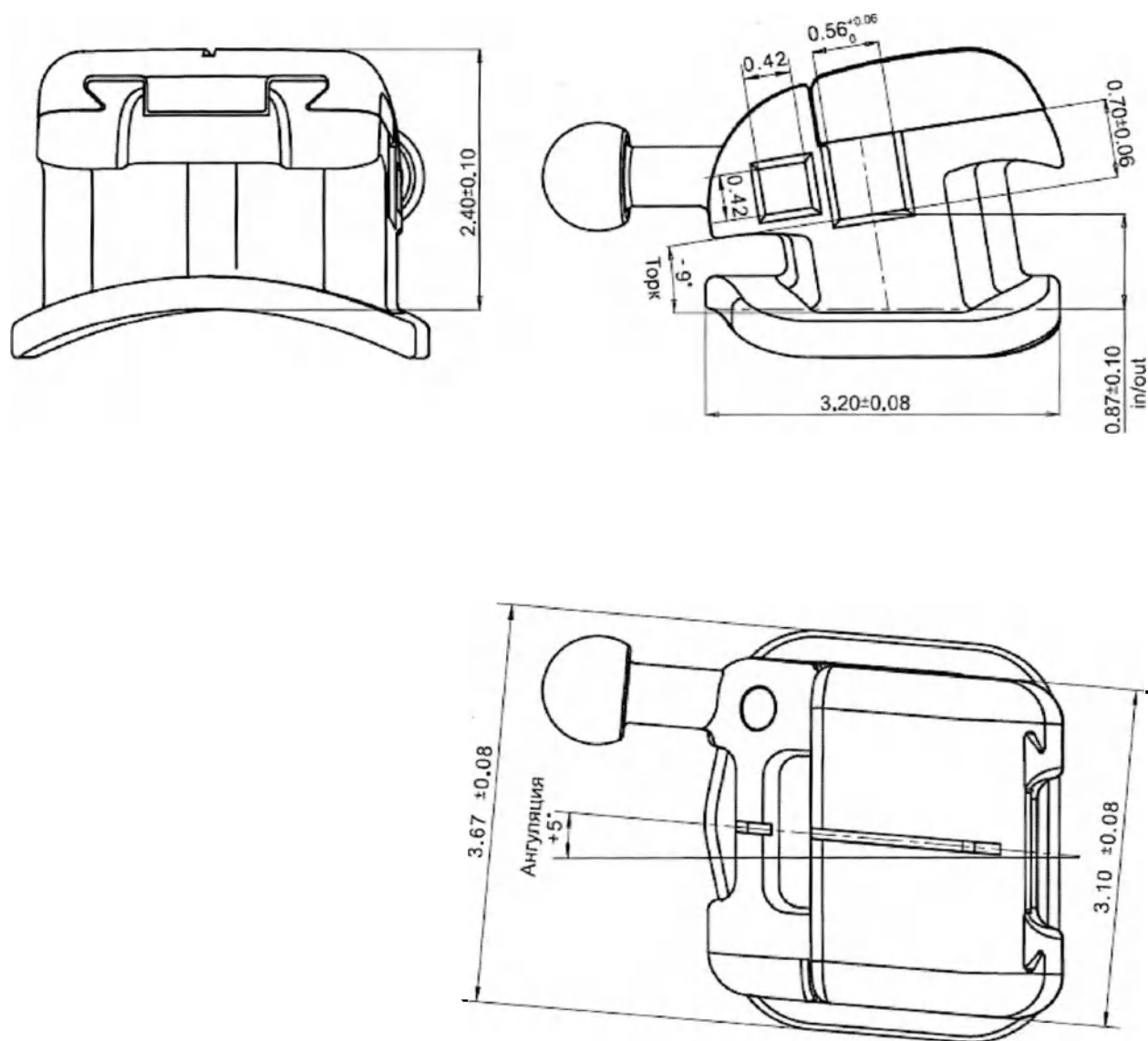


Рисунок 27. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 23 зуб, с крючком, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-231(23)	-9	+5	0,095

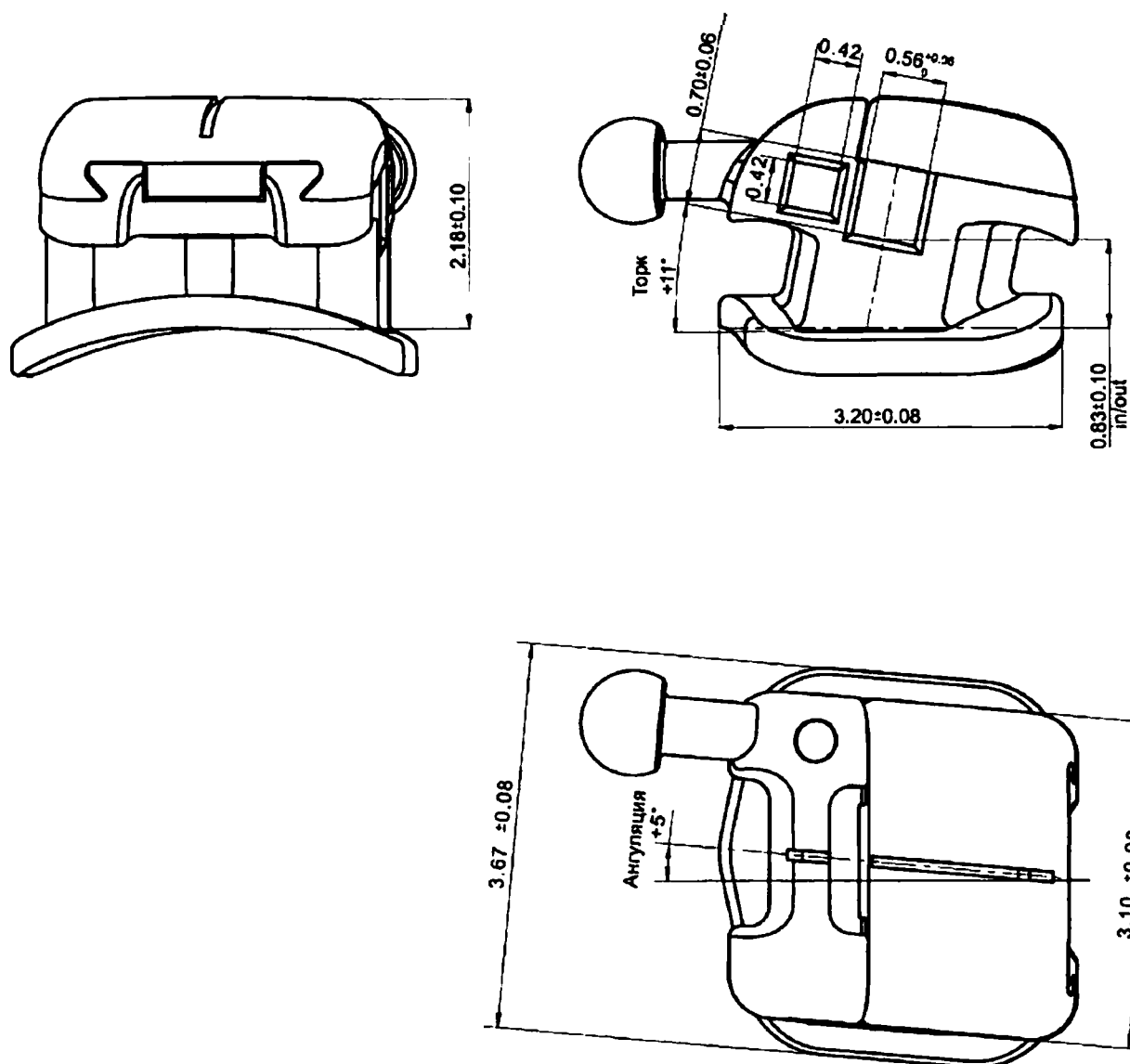


Рисунок 28. Бреккет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 23 зуб, с крючком, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-233(23)	+11	+5	0,095

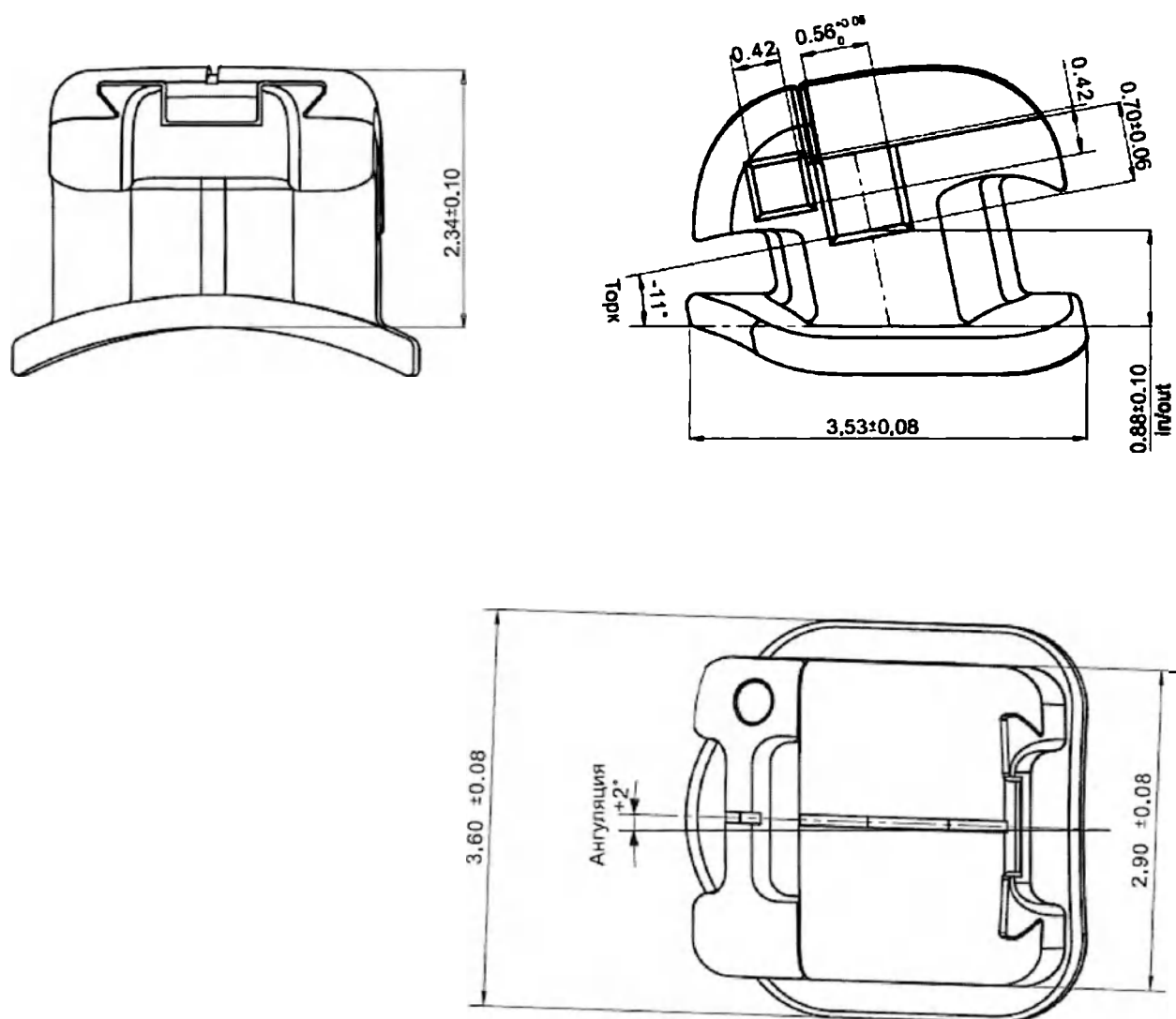


Рисунок 29. Бреккет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 24 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-242(24)	-11	+2	0,090

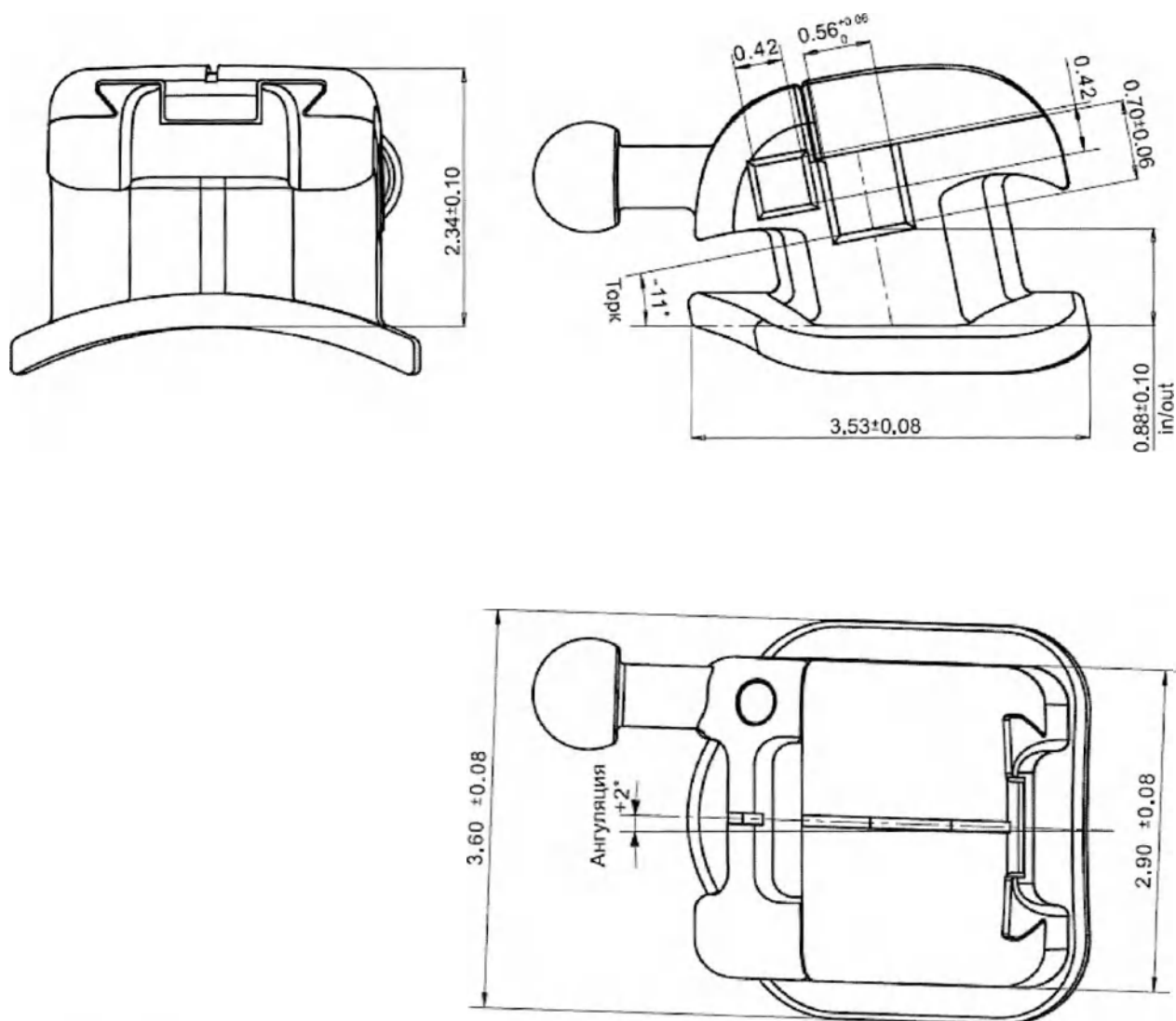


Рисунок 30. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 24 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-242(24)	-11	+2	0,095

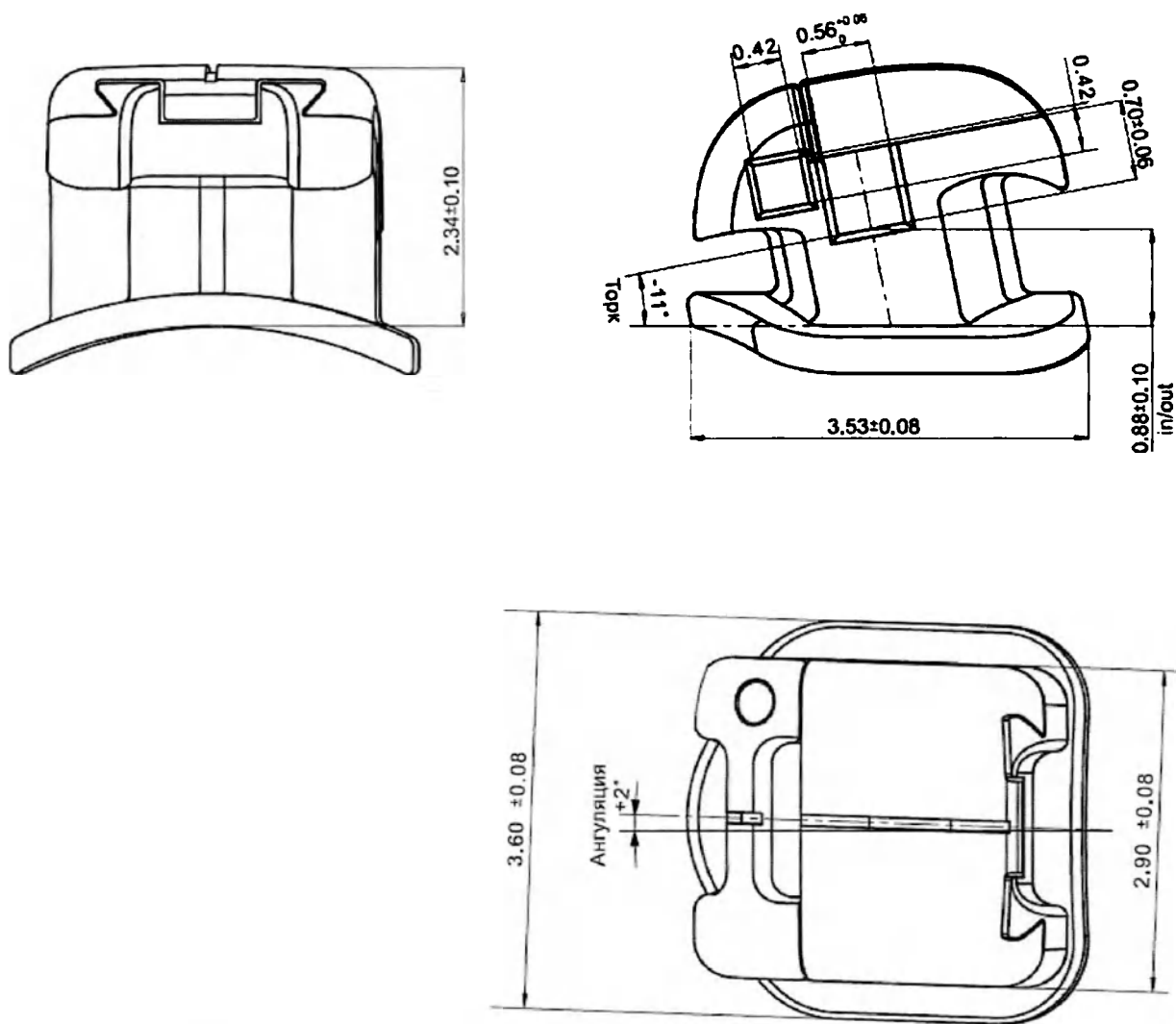


Рисунок 31. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 25 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-252(25)	-11	+2	0,090

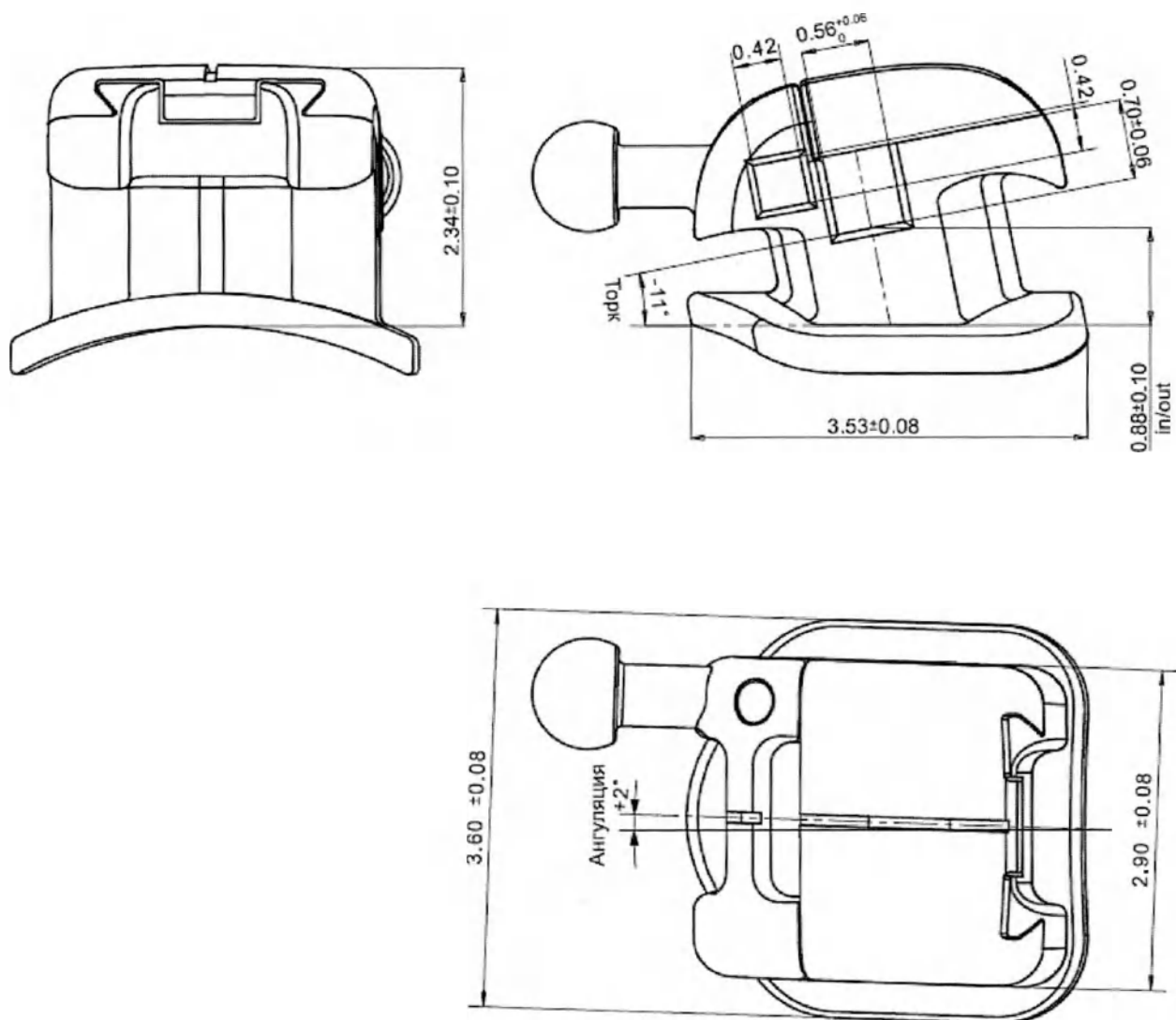


Рисунок 32. Бреккет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 25 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-252(25)	-11	+2	0,095

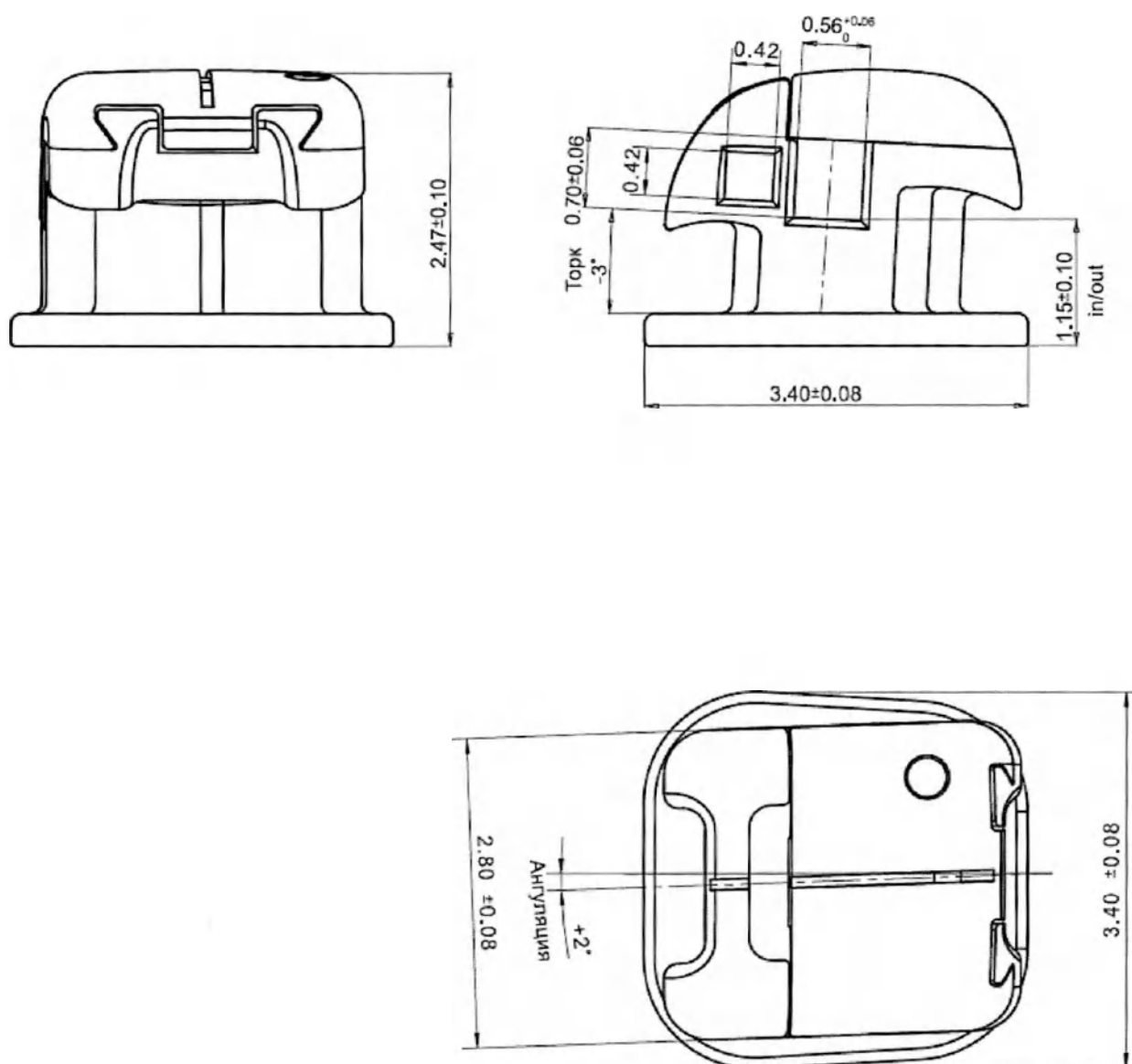


Рисунок 33. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 31 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-312(31)	-3	+2	0,090

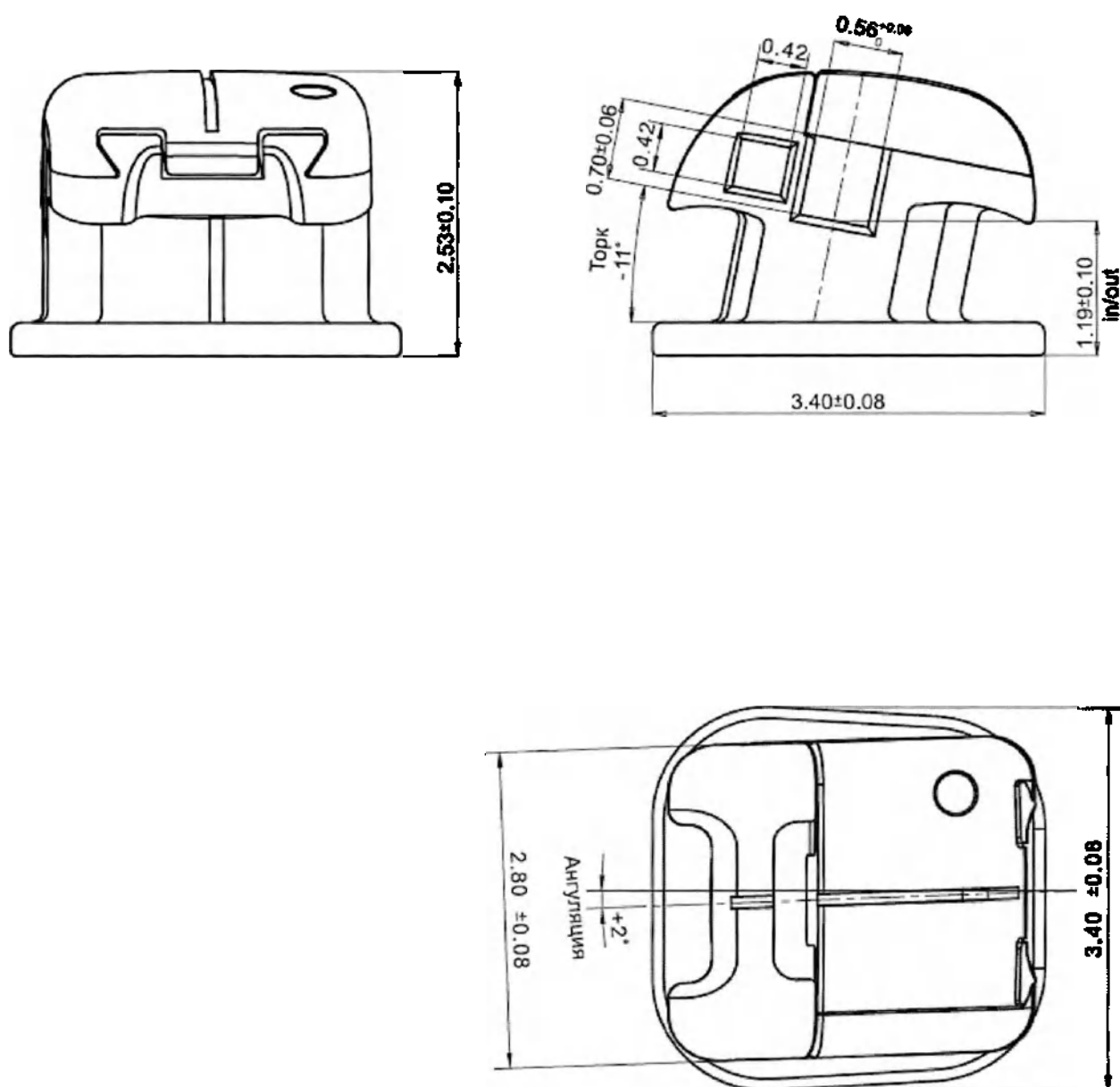


Рисунок 34. Брекеты металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 31 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-311(31)	-11	+2	0,090

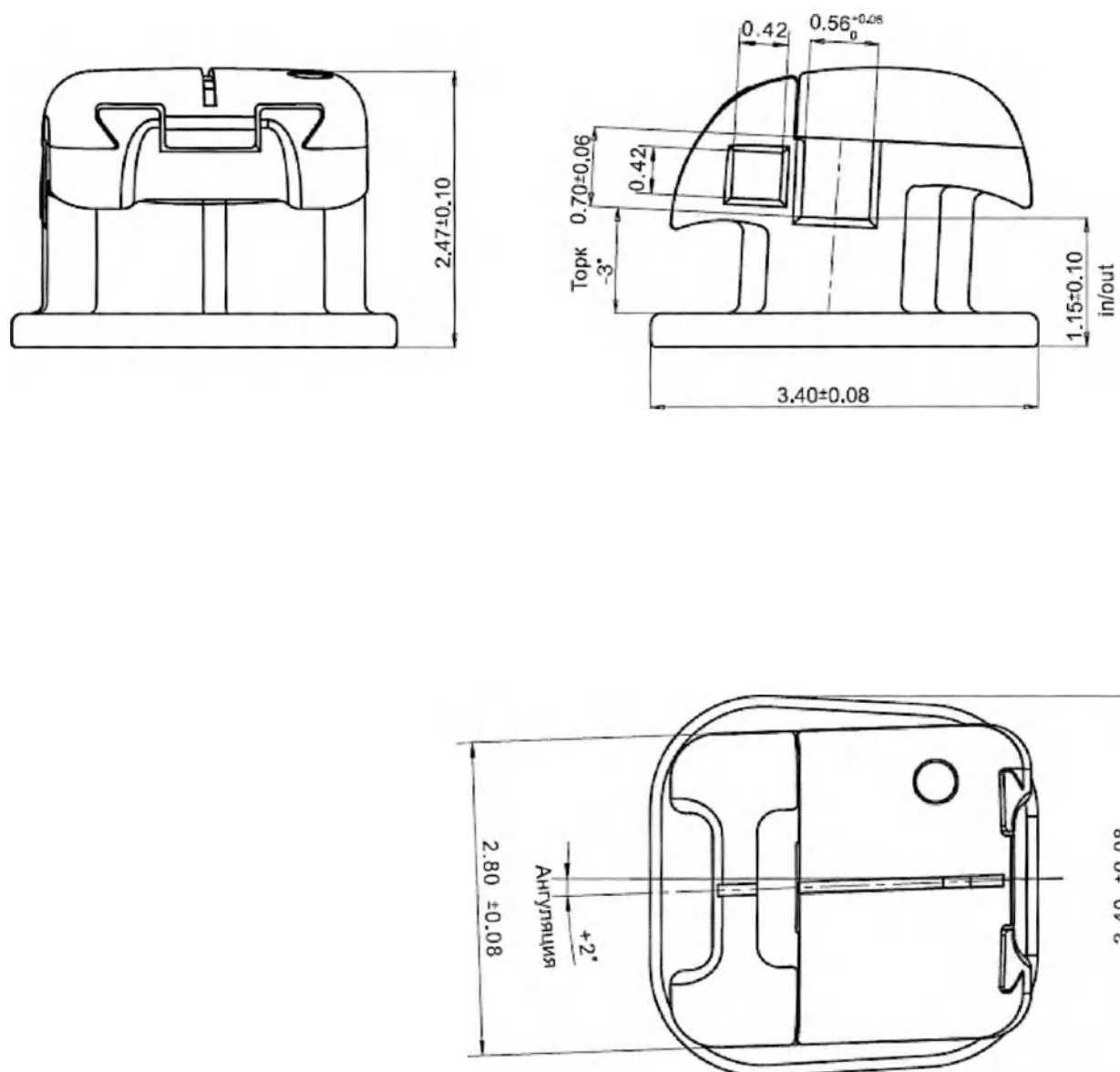


Рисунок 35. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 32 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-322(32)	-3	+2	0,090

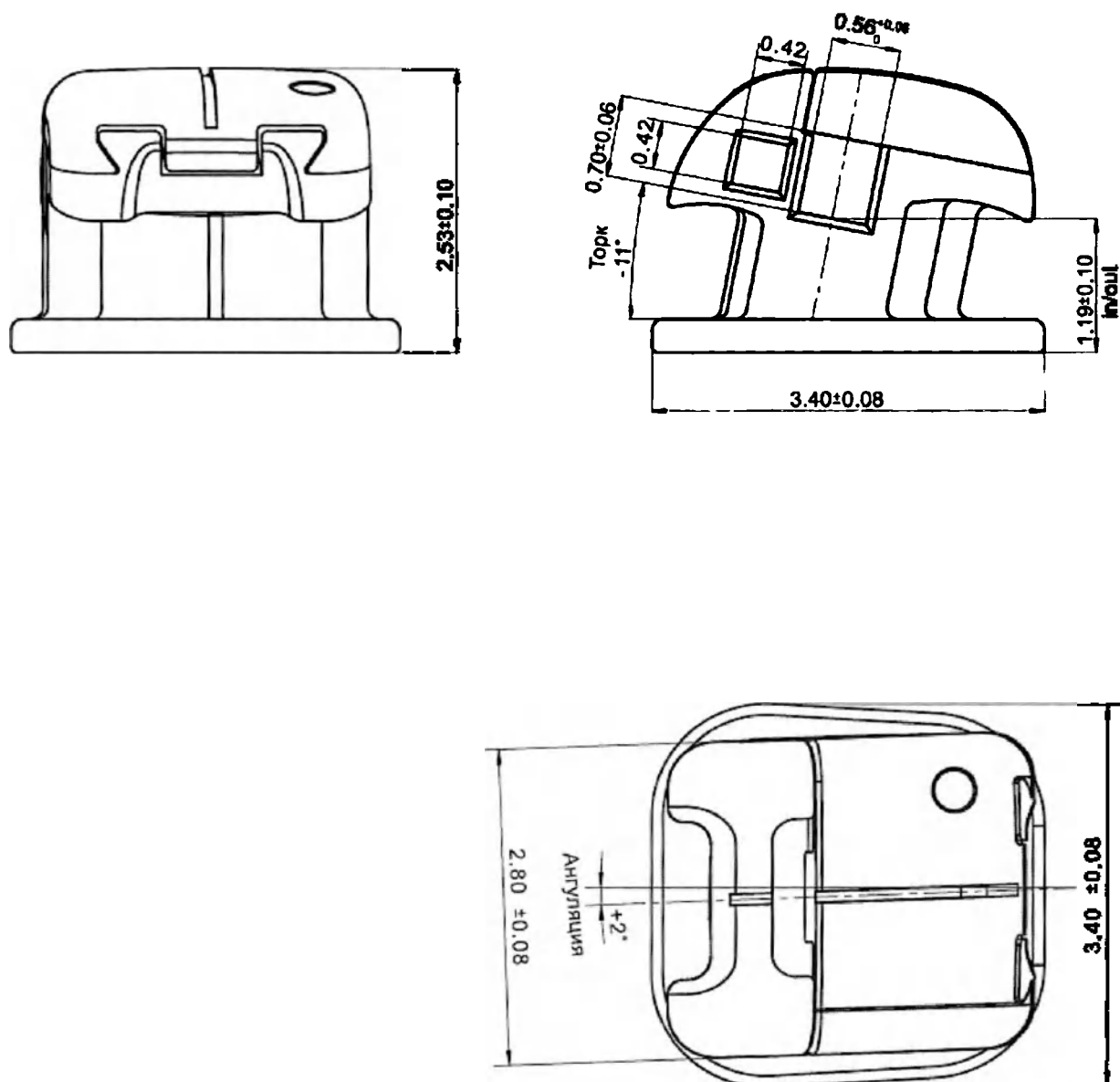


Рисунок 36. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 32 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-321(32)	-11	+2	0,090

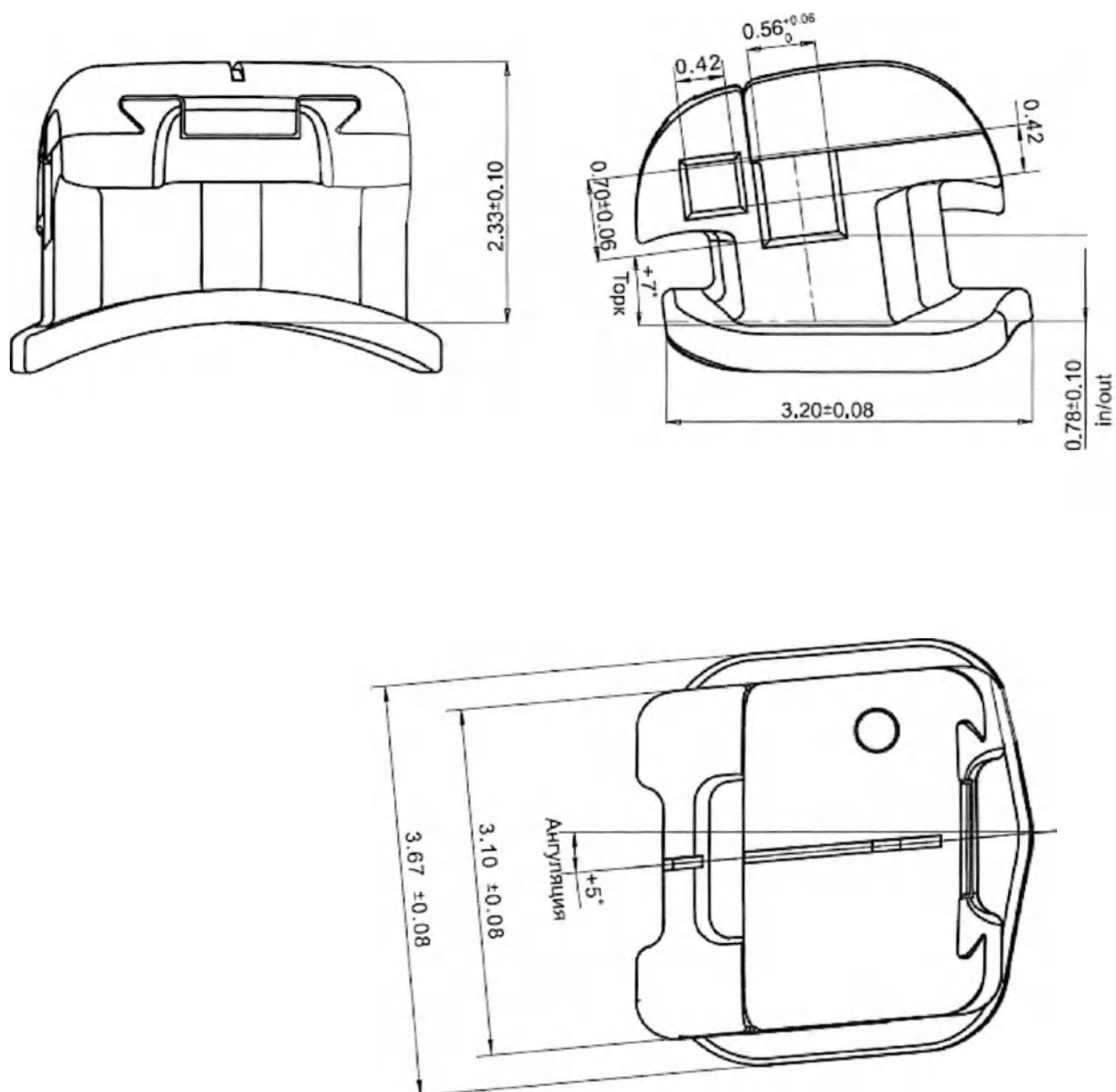


Рисунок 37. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 33 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-332(33)	+7	+5	0,090

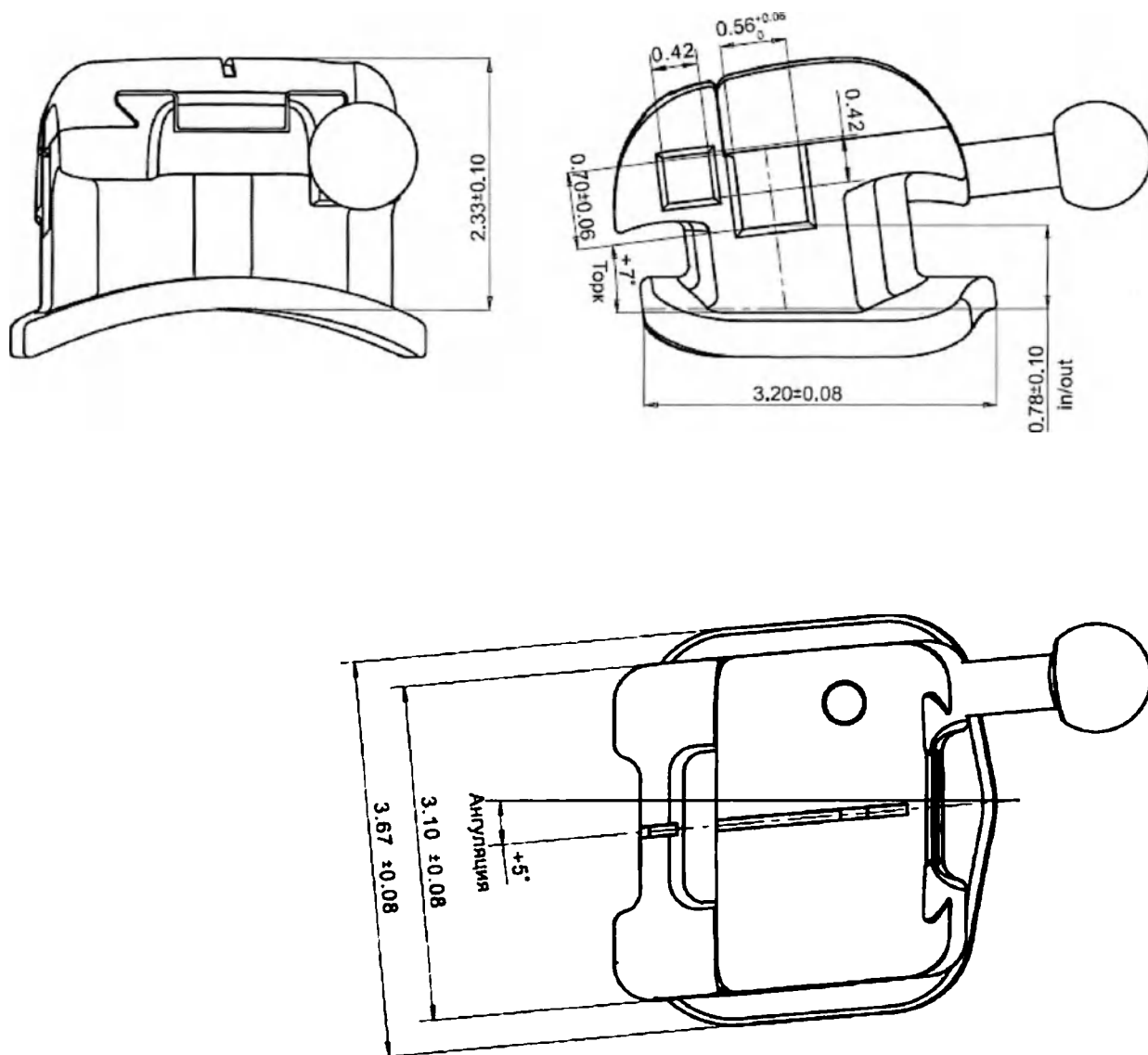


Рисунок 38. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 33 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-332(33)	+7	+5	0,095

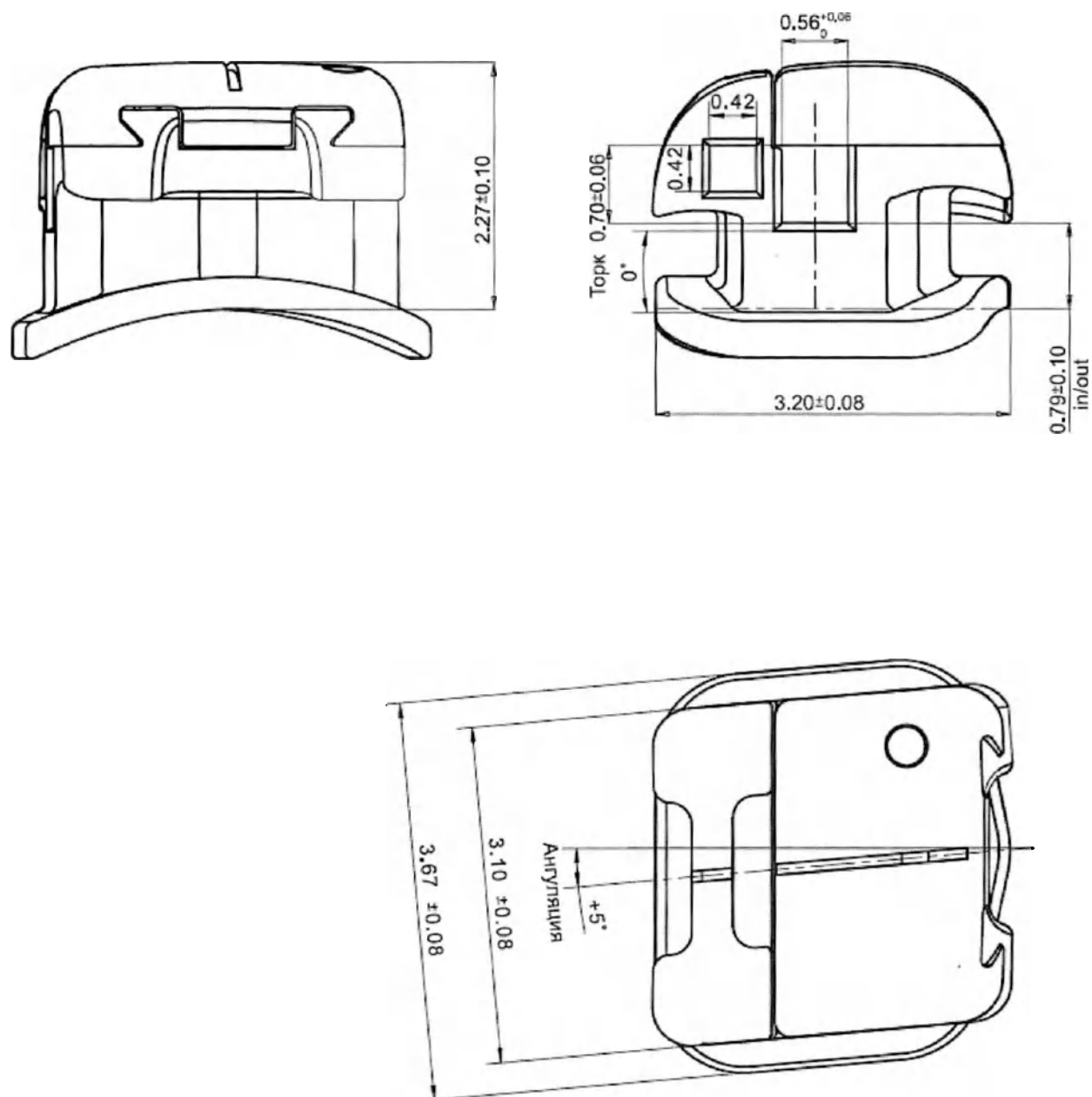


Рисунок 39. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 33 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-331(33)	0	+5	0,090

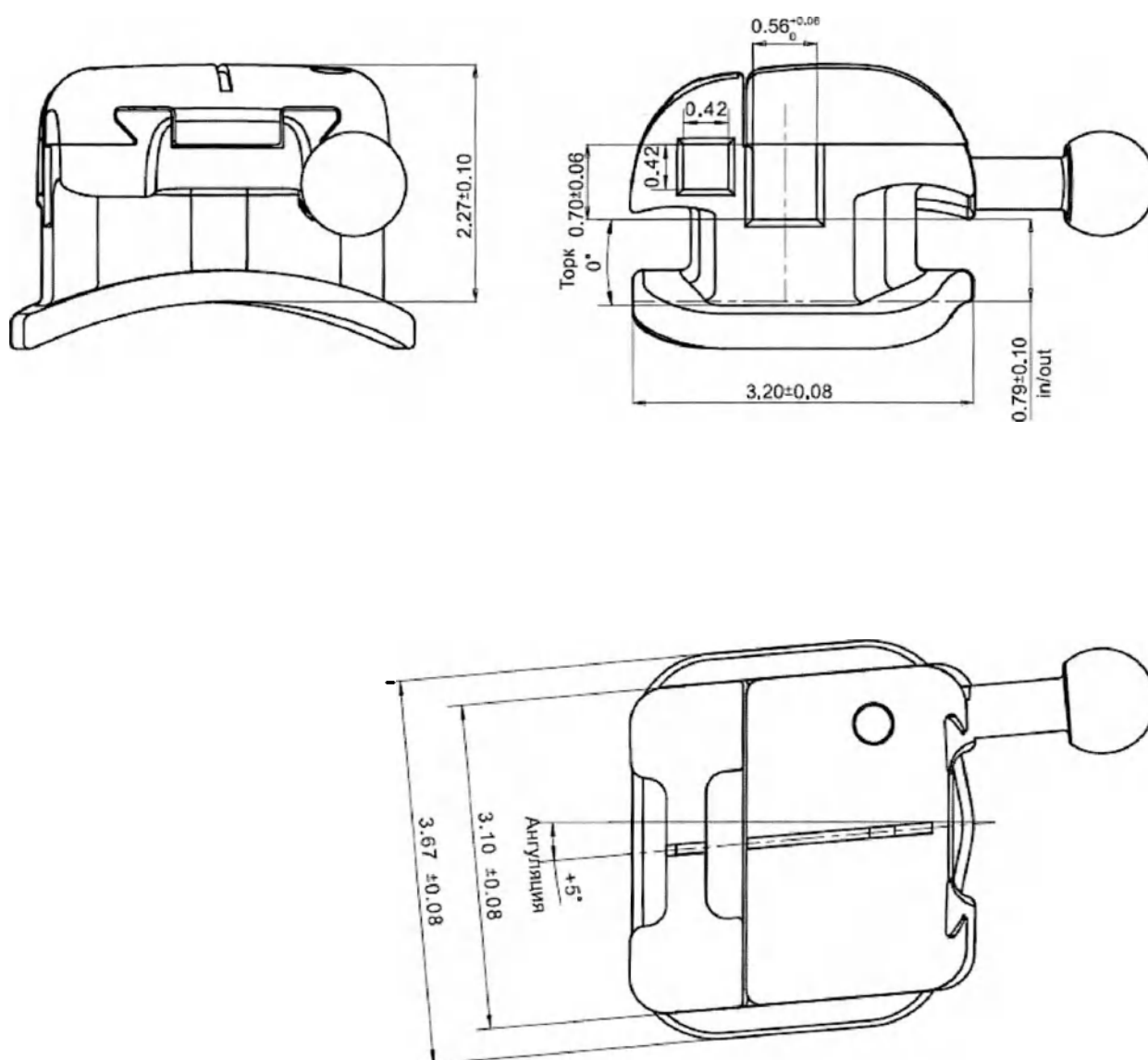


Рисунок 40. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 33 зуб, с крючком, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-331(33)	0	+5	0,095

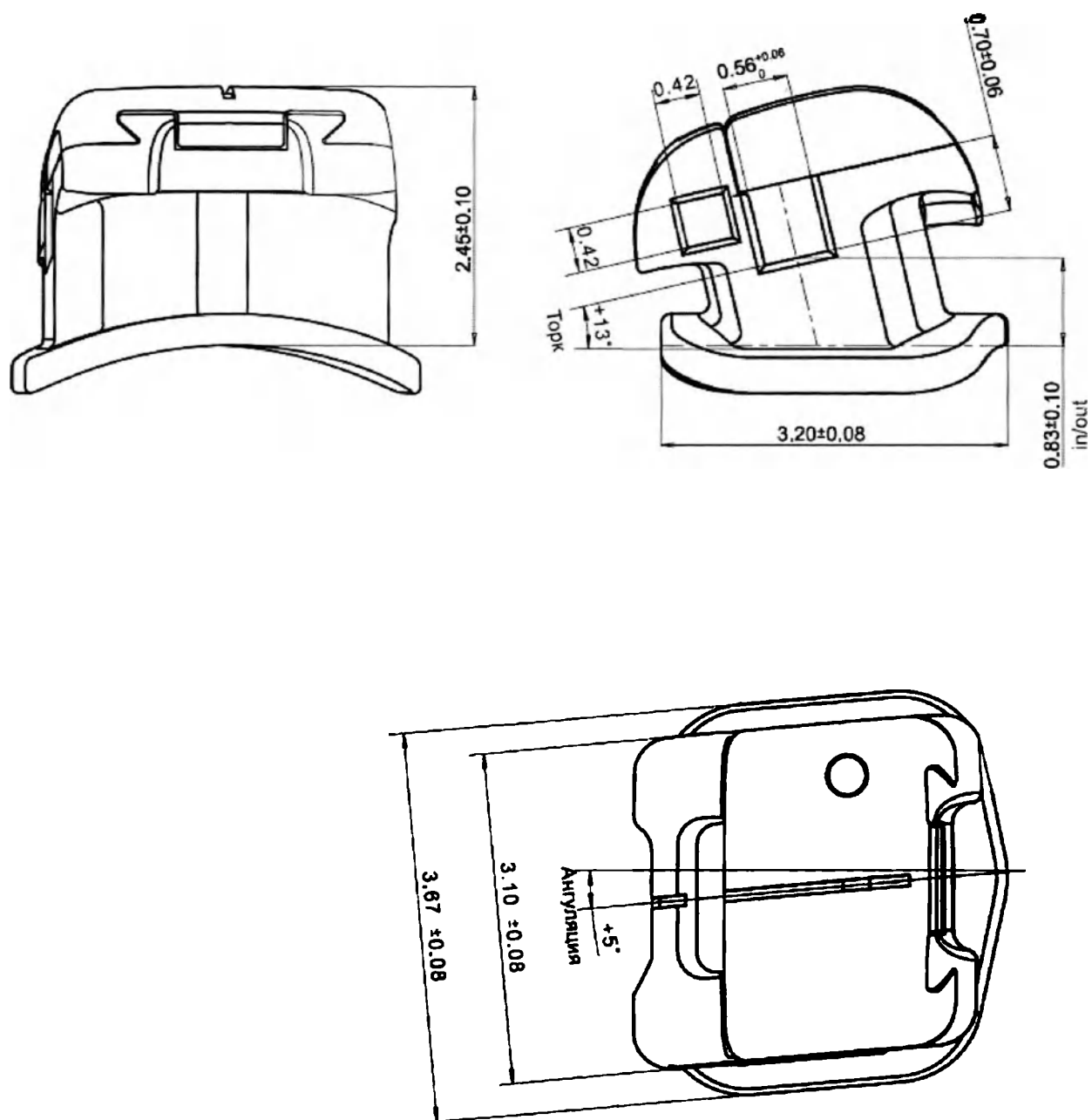


Рисунок 41. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 33 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-333(33)	+13	+5	0,090

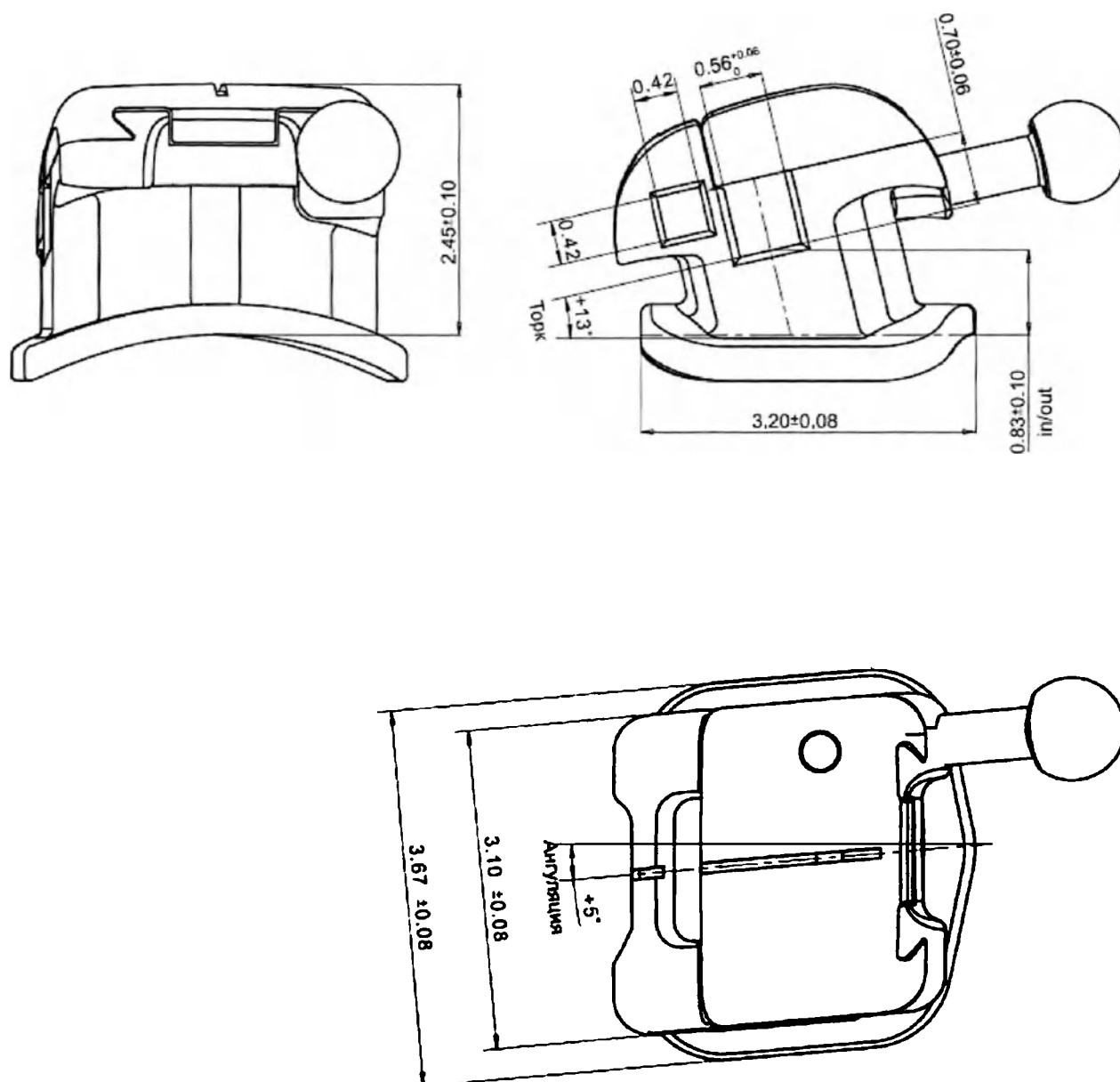


Рисунок 42. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 33 зуб, с крючком, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-333(33)	+13	+5	0,095

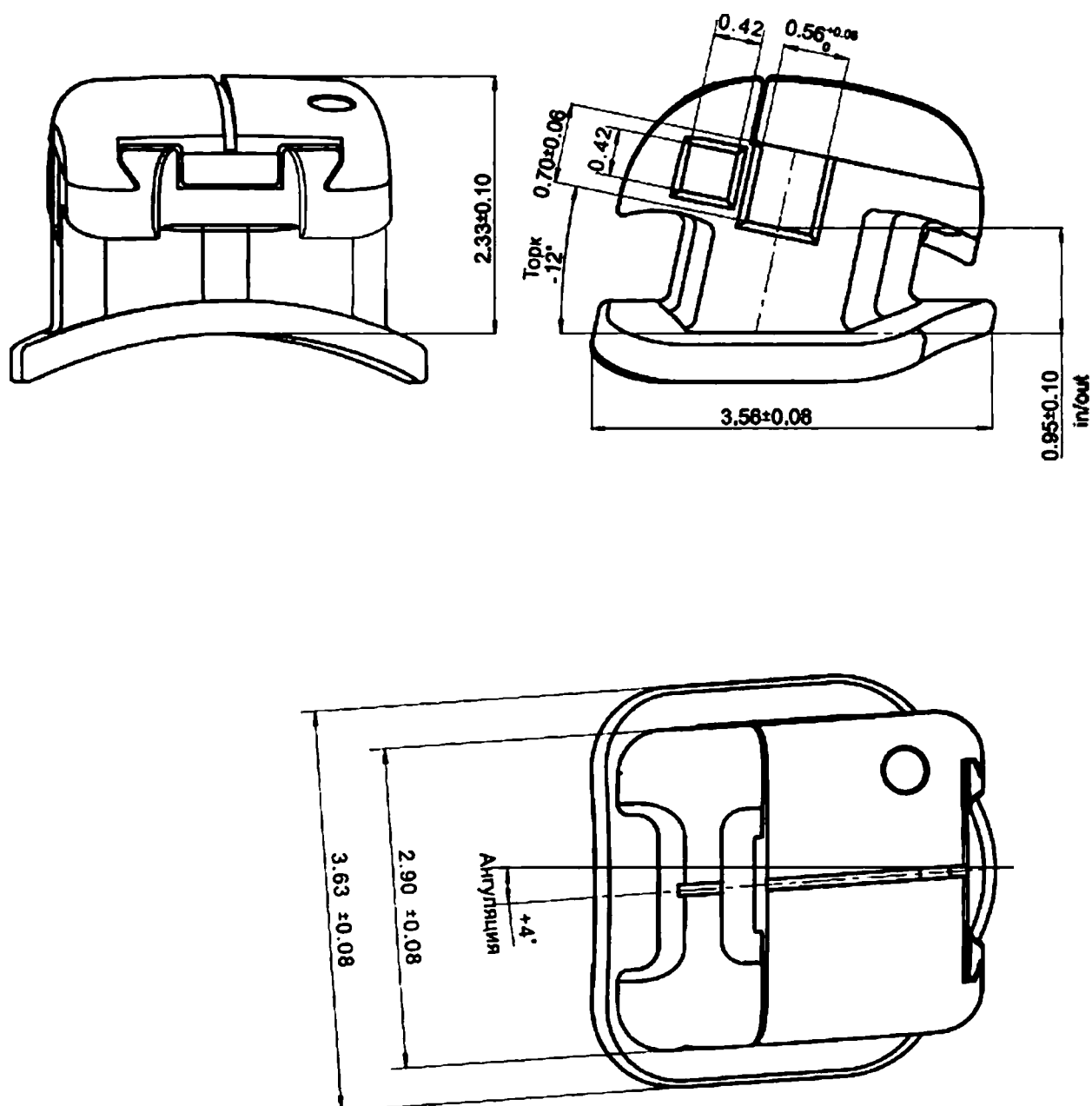


Рисунок 43. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 34 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-342(34)	-12	+4	0,090

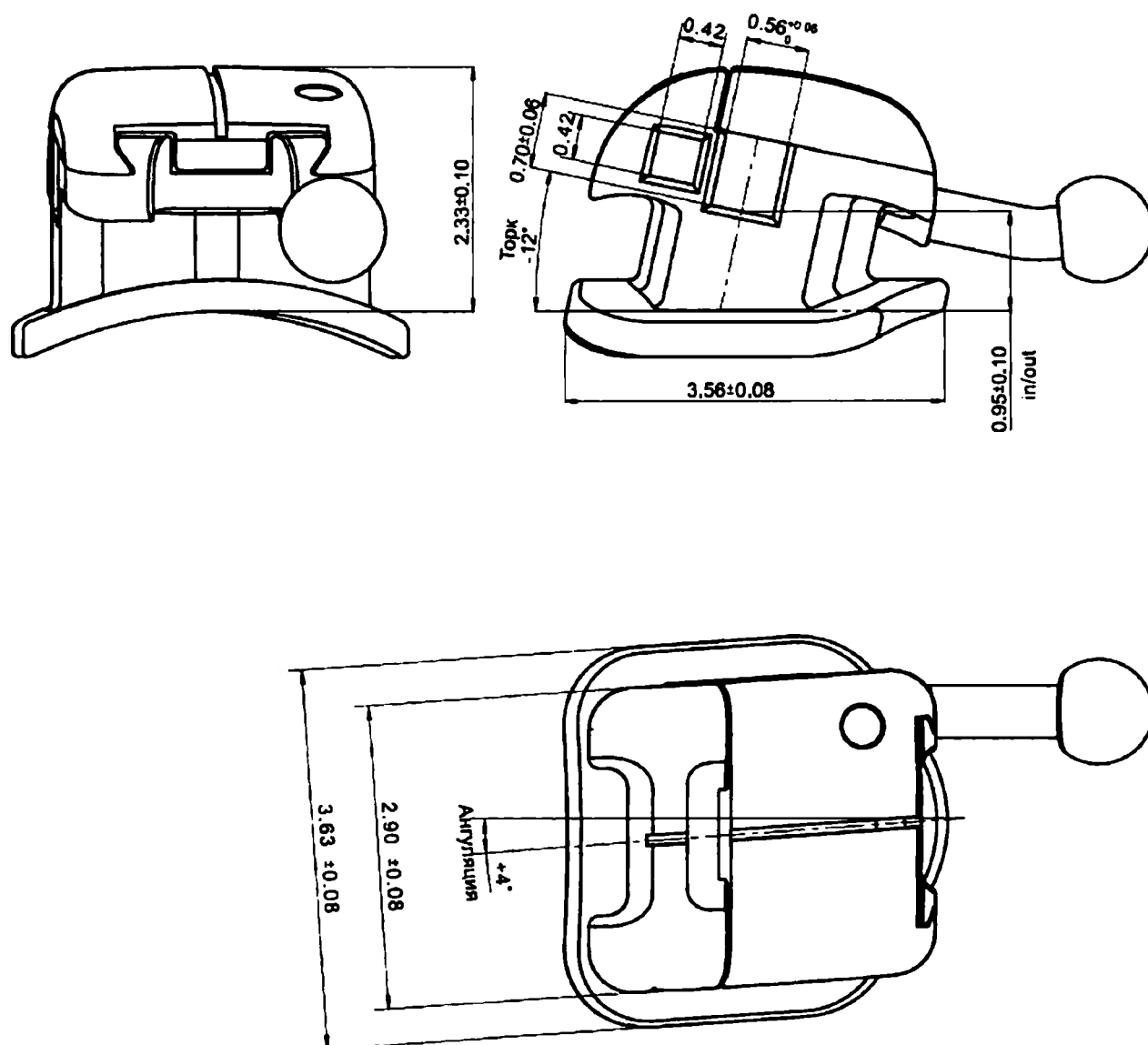


Рисунок 44. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 34 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-342(34)	-12	+4	0,095

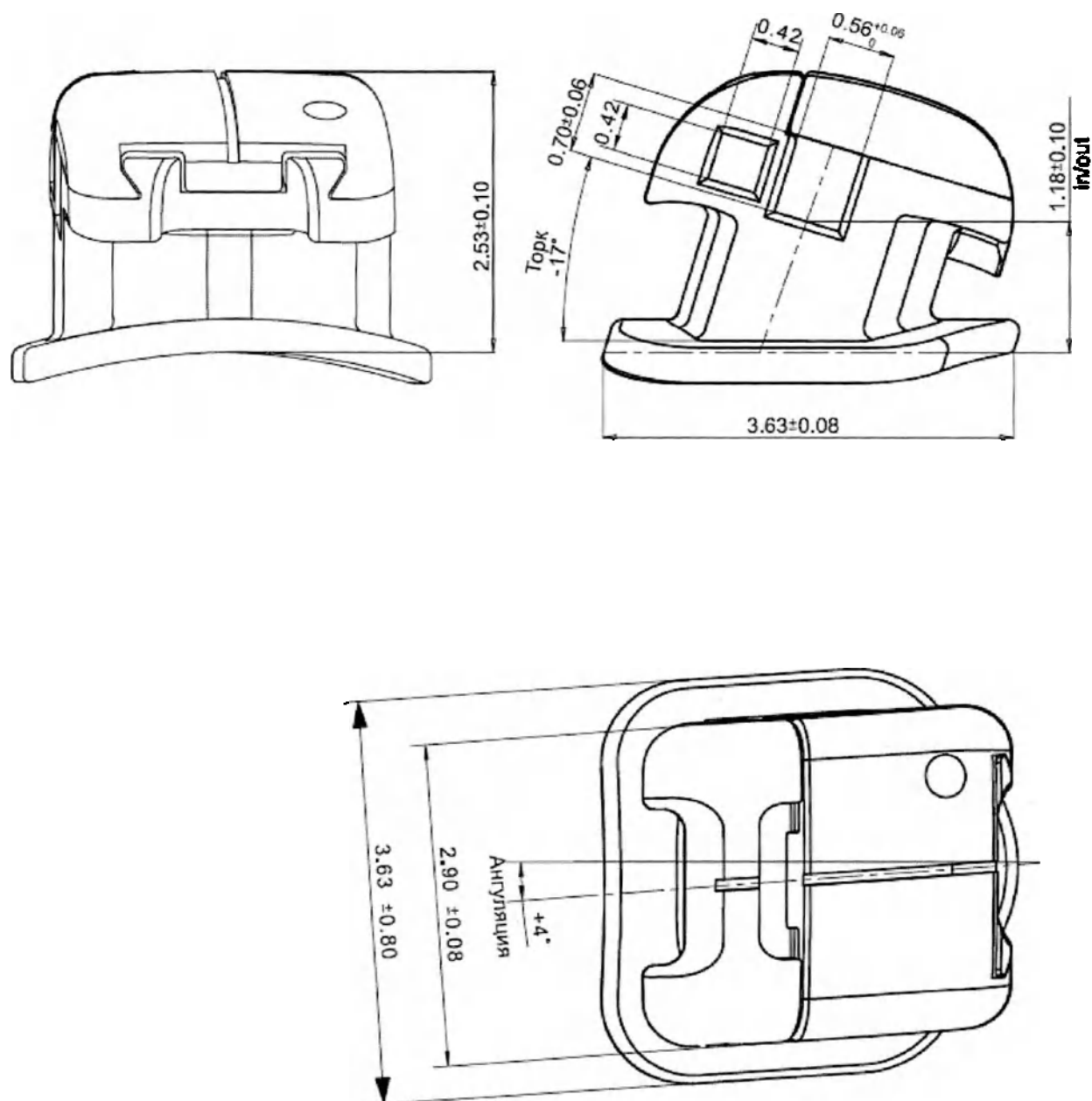


Рисунок 45. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 35 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-352(35)	-17	+4	0,090

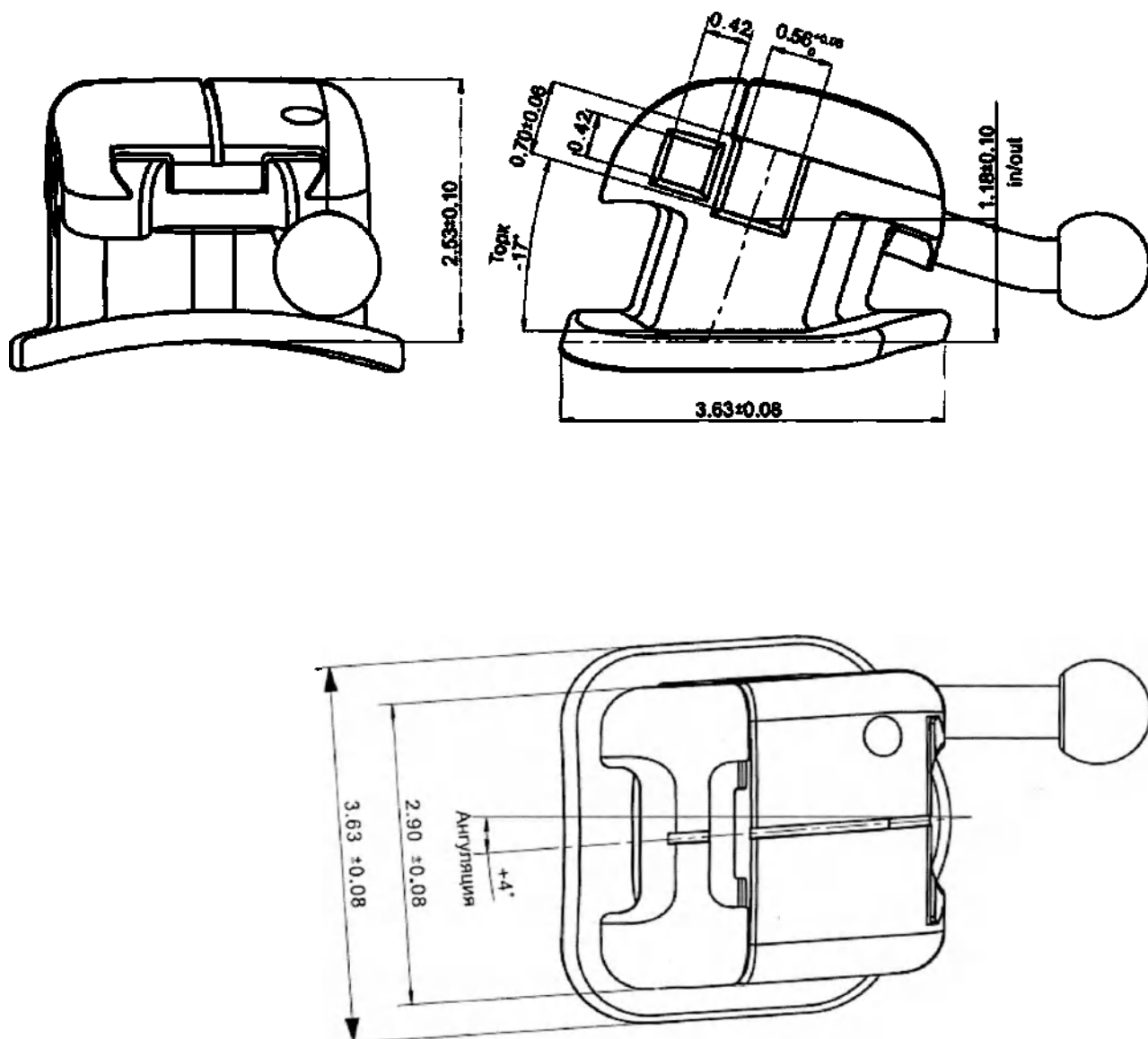


Рисунок 46. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 35 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-352(35)	-17	+4	0,095

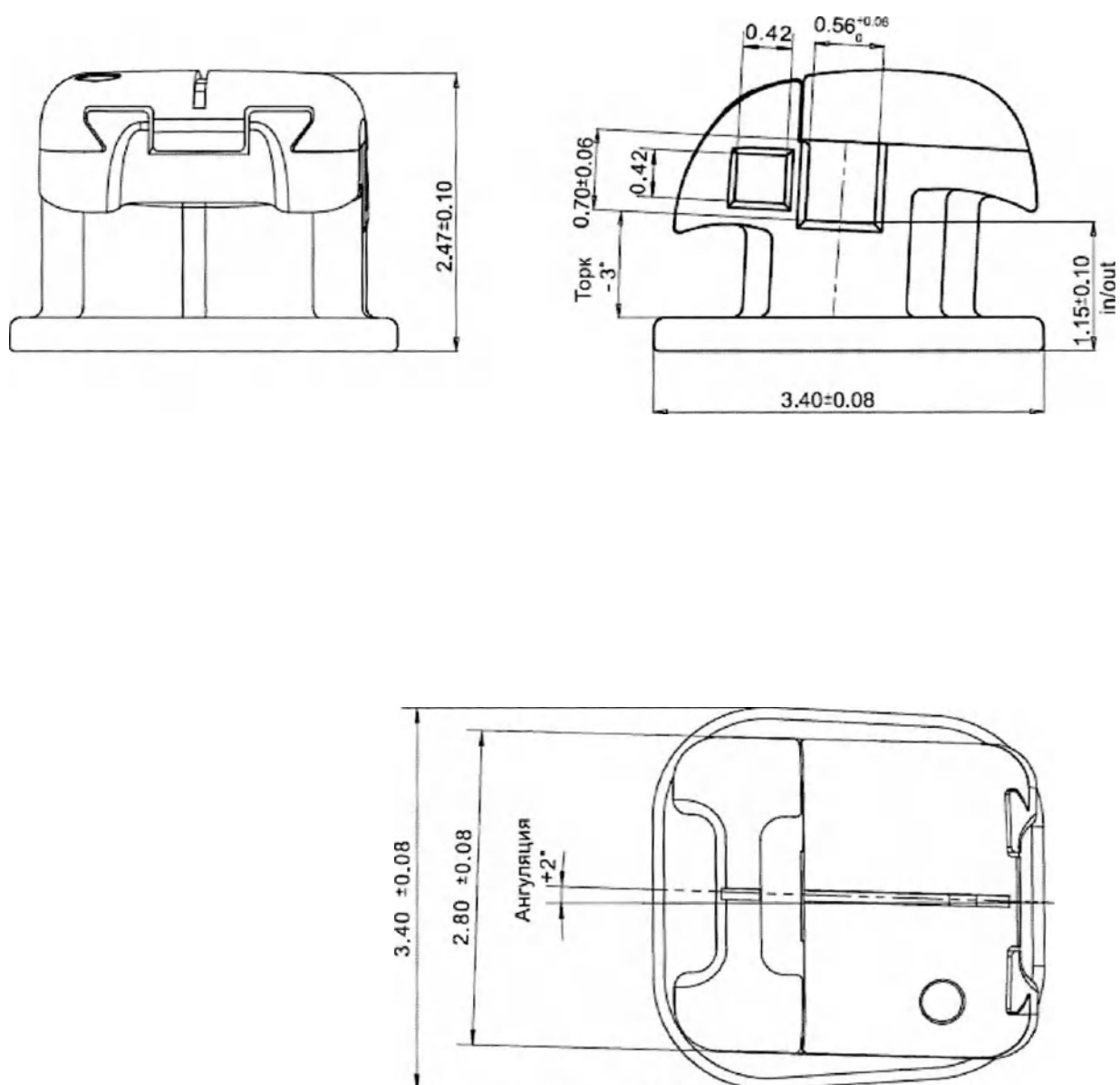


Рисунок 47. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 41 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-412(41)	-3	+2	0,090

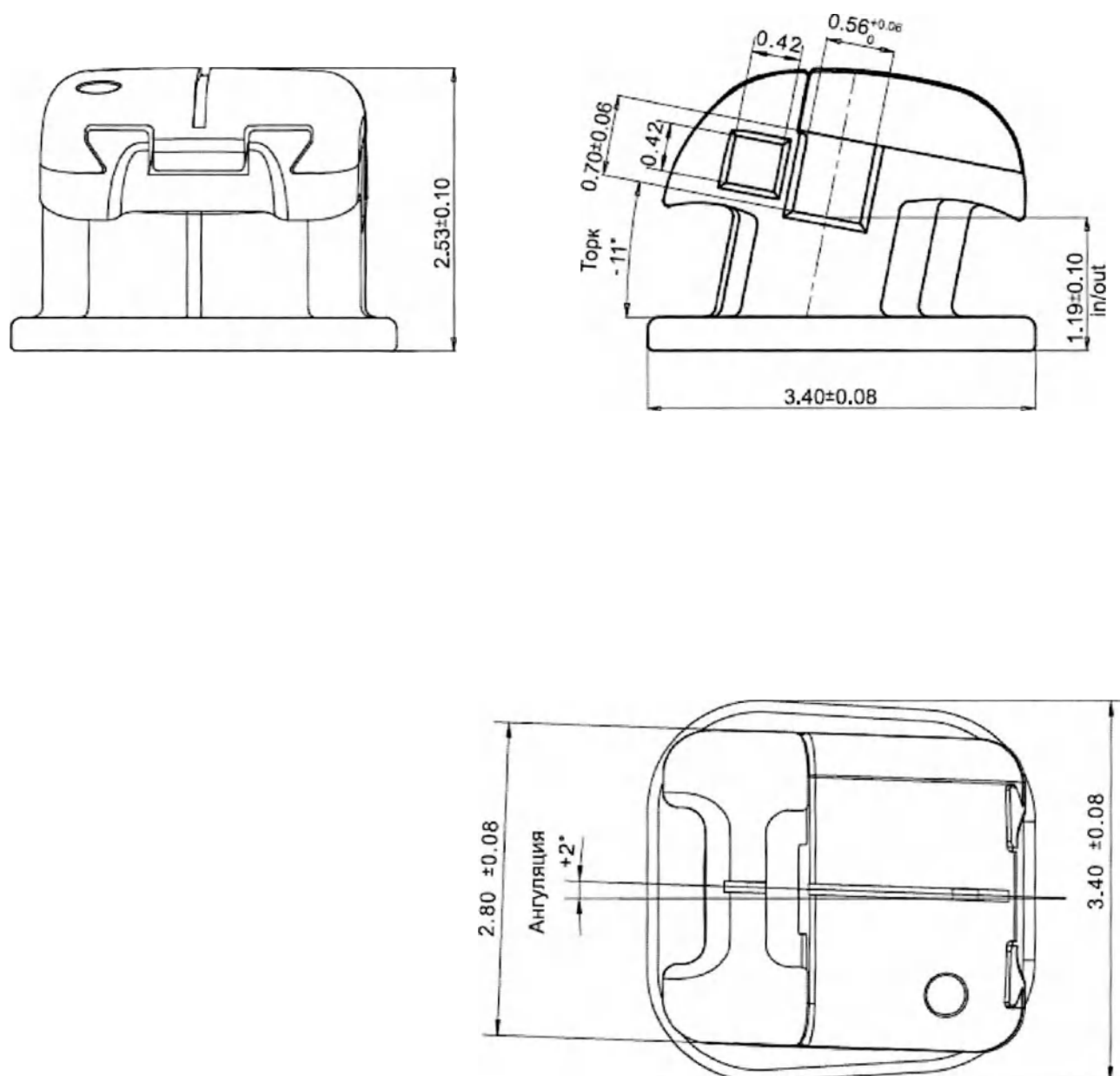


Рисунок 48. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 41 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-411(41)	-11	+2	0,090

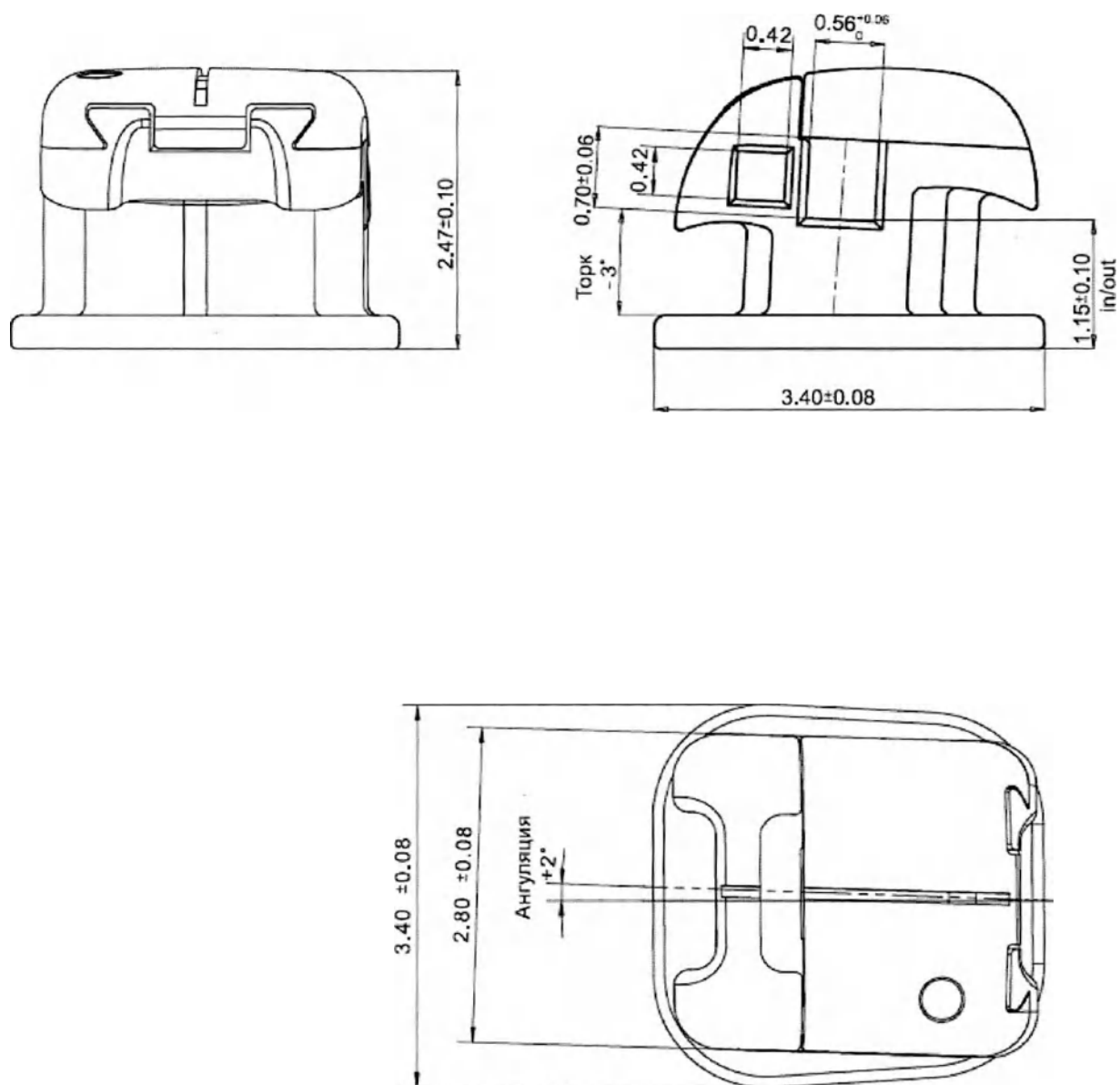


Рисунок 49. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 42 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-422(42)	-3	+2	0,090

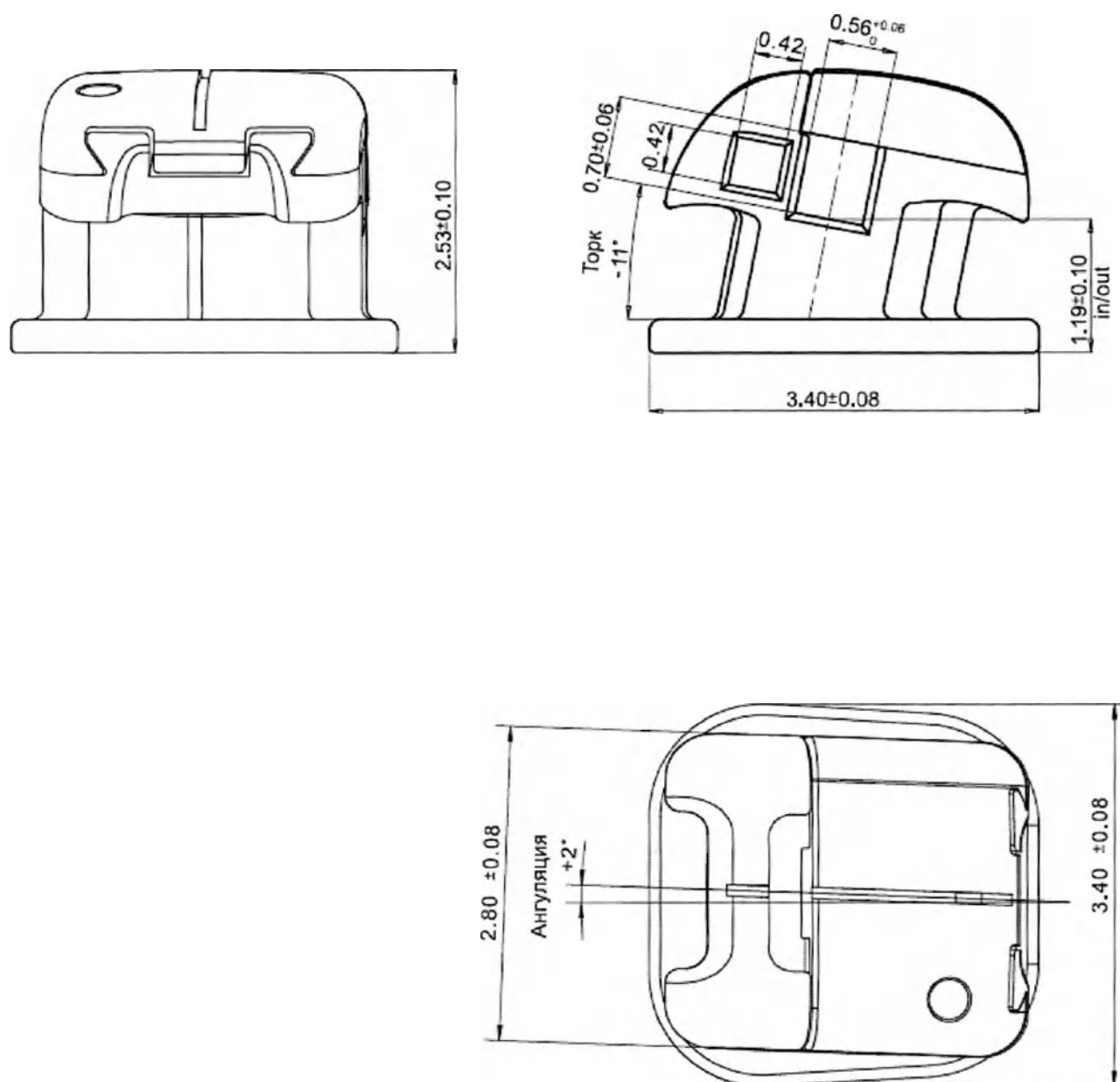


Рисунок 50. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 42 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-421(42)	-11	+2	0,090

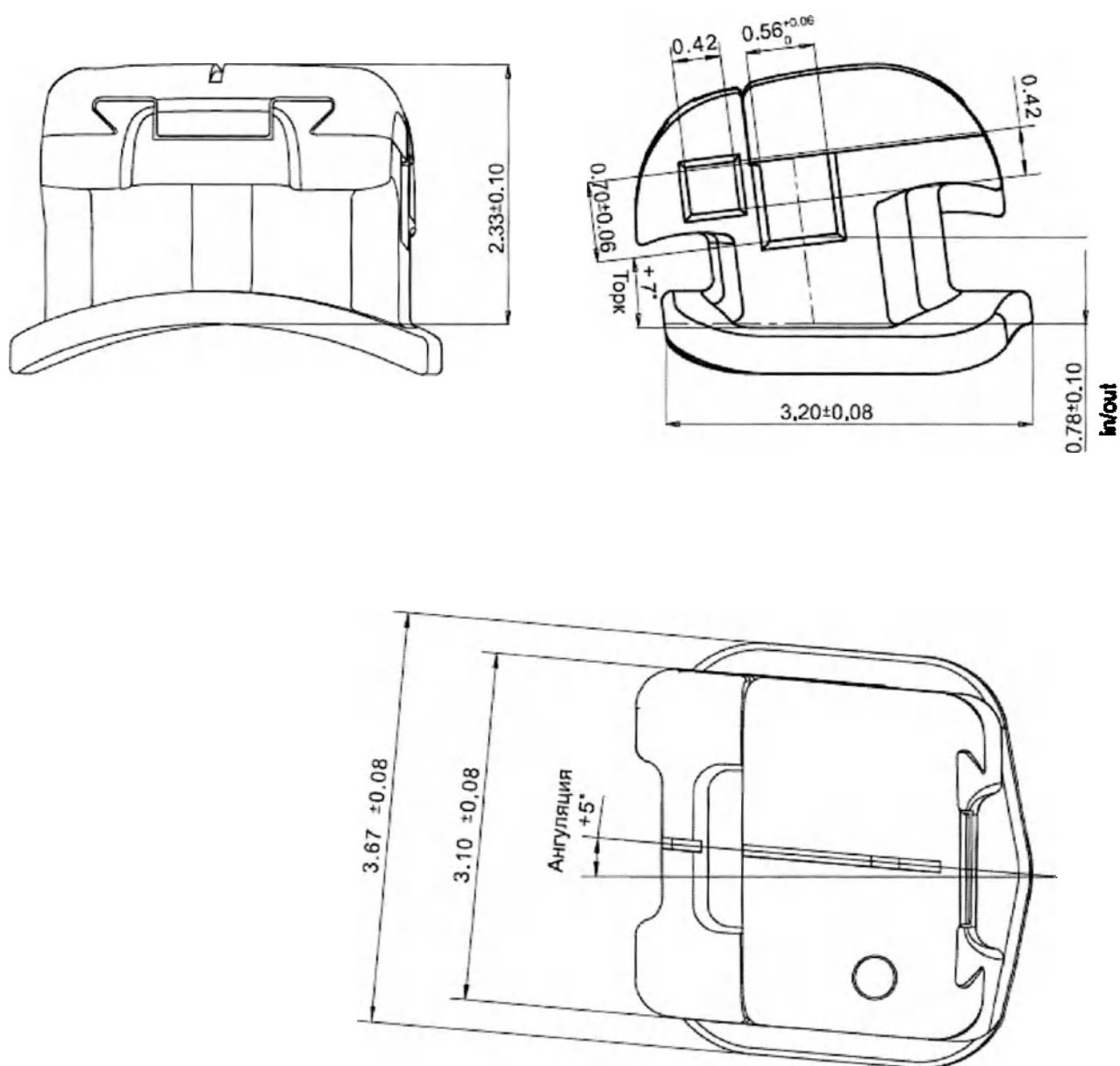


Рисунок 51. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-432(43)	+7	+5	0,090

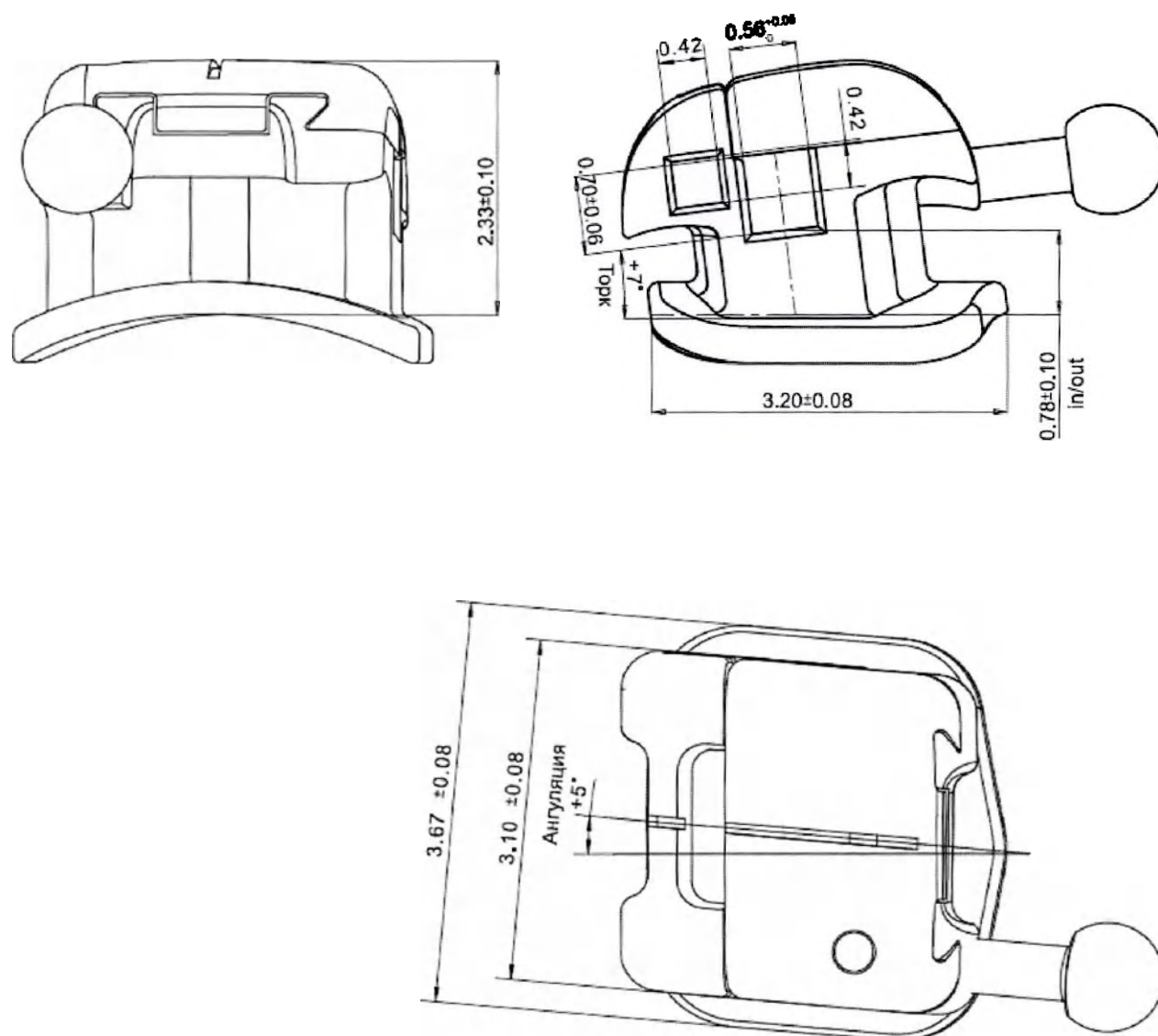


Рисунок 52. Бреккет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 43 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-432(43)	+7	+5	0,095

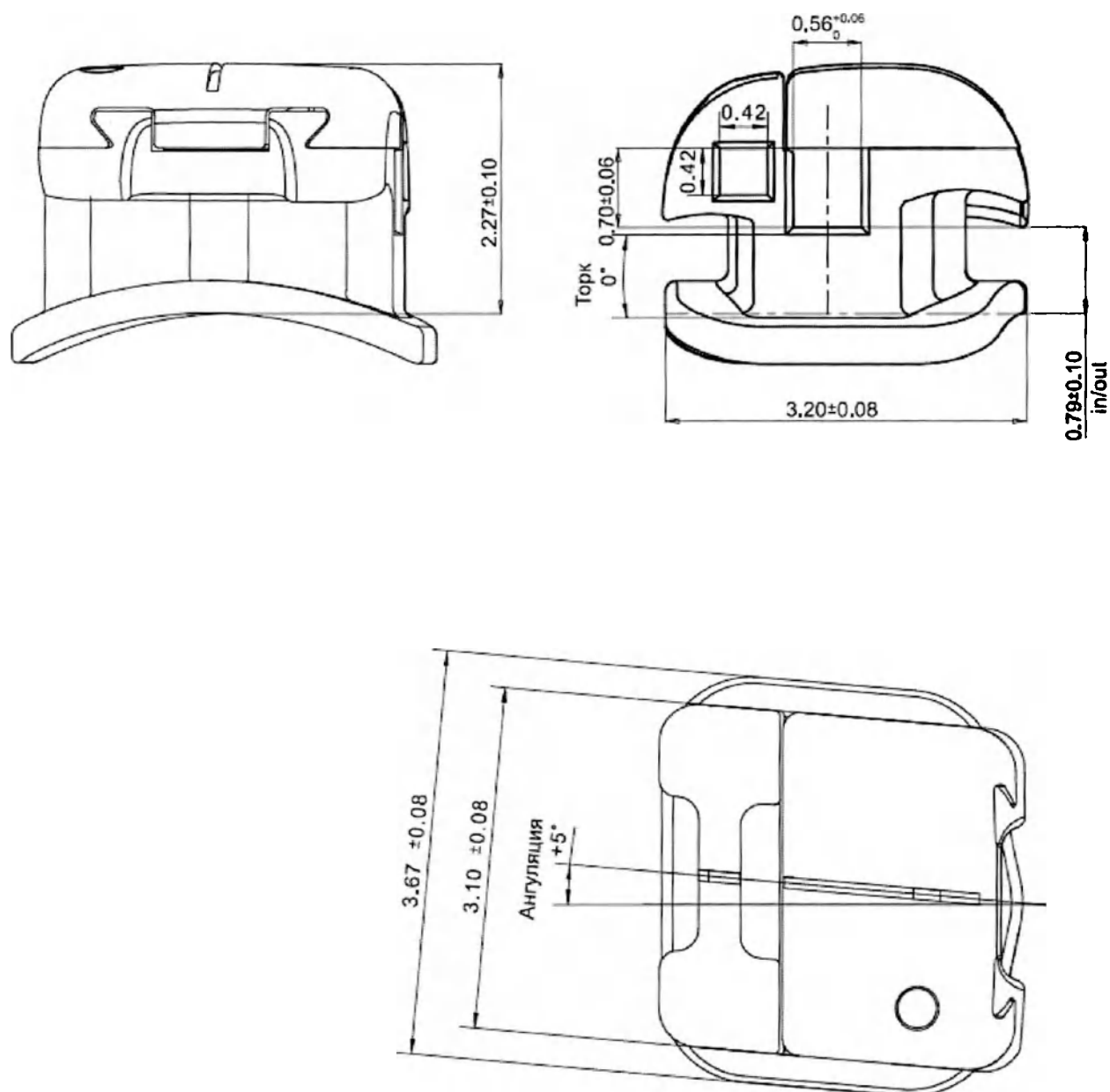


Рисунок 53. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-431(43)	0	+5	0,090

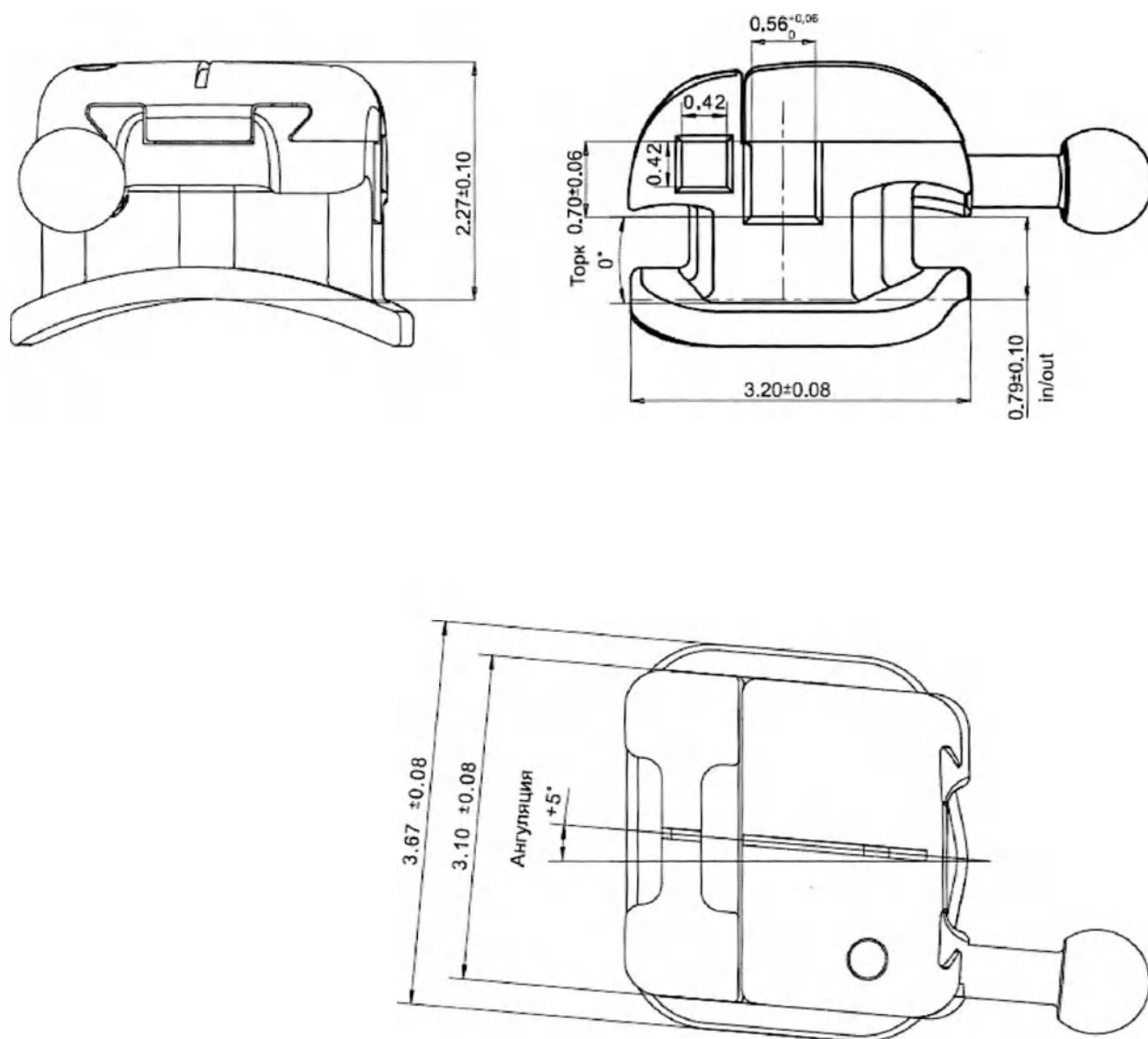


Рисунок 54. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 43 зуб, с крючком, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-431(43)	0	+5	0,095

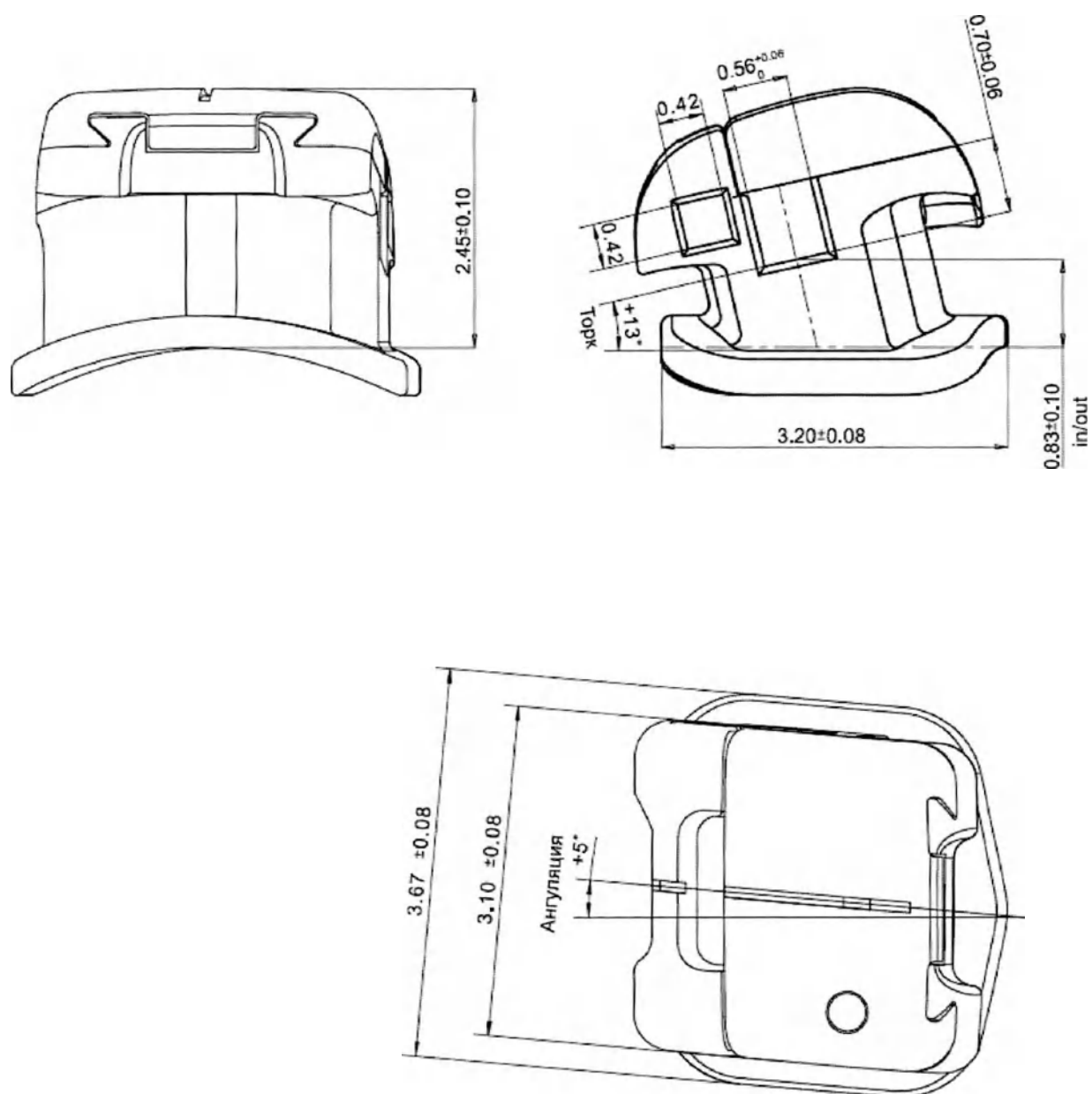


Рисунок 55. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-433(43)	+13	+5	0,090

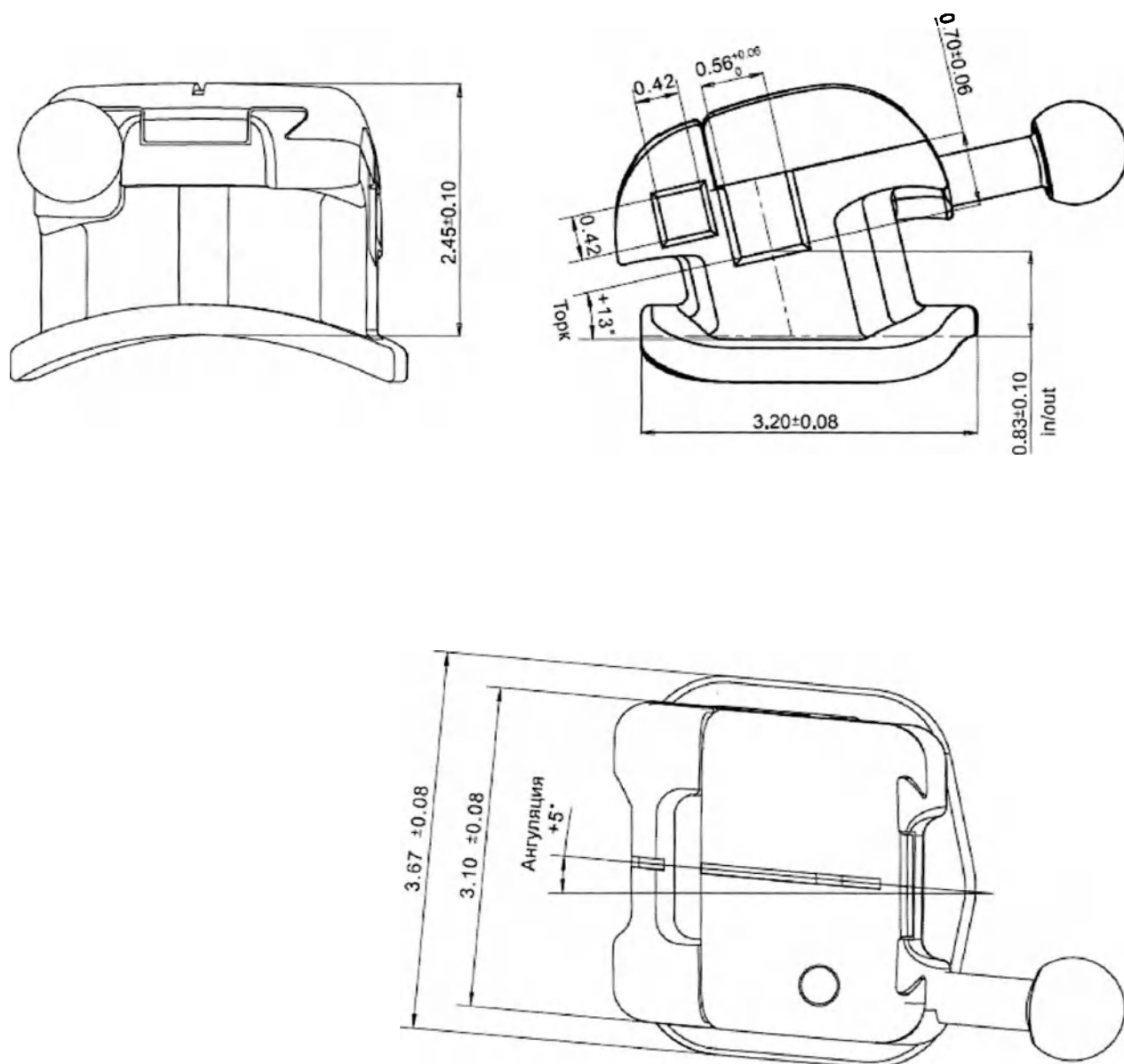


Рисунок 56. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 43 зуб, с крючком, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-433(43)	+13	+5	0,095

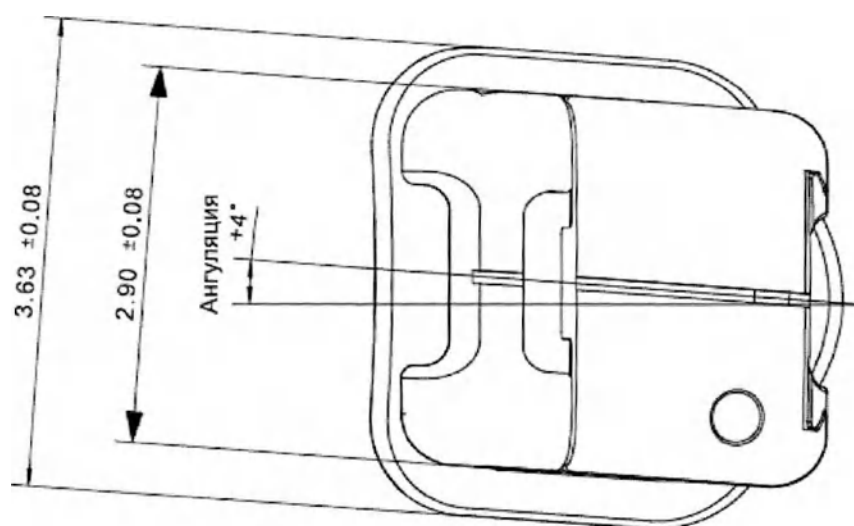
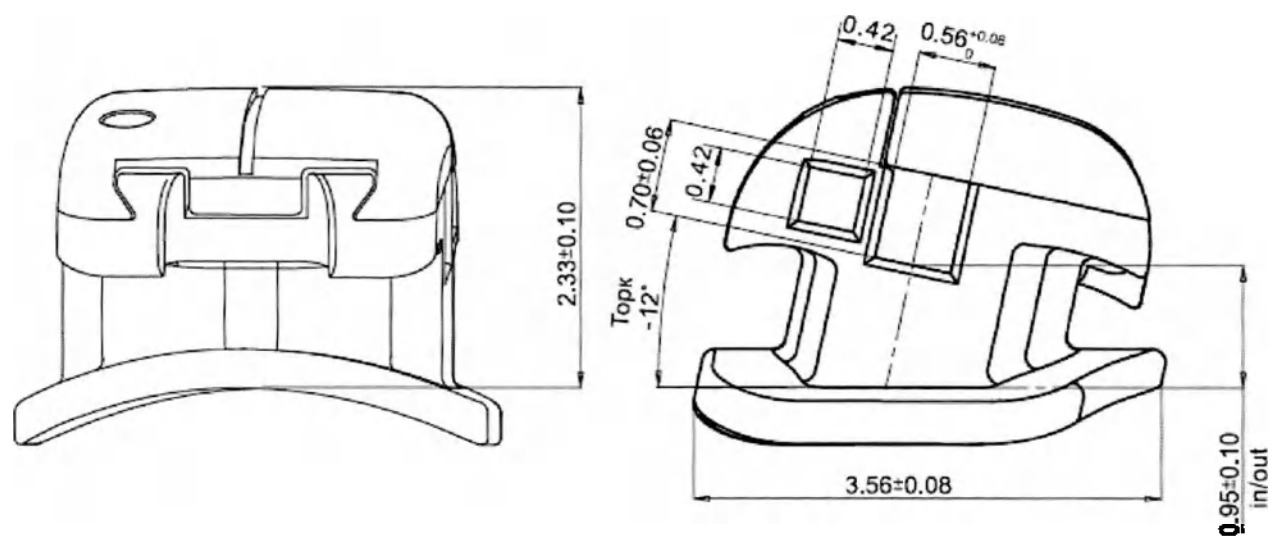


Рисунок 57. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 44 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-442(44)	-12	+4	0,090

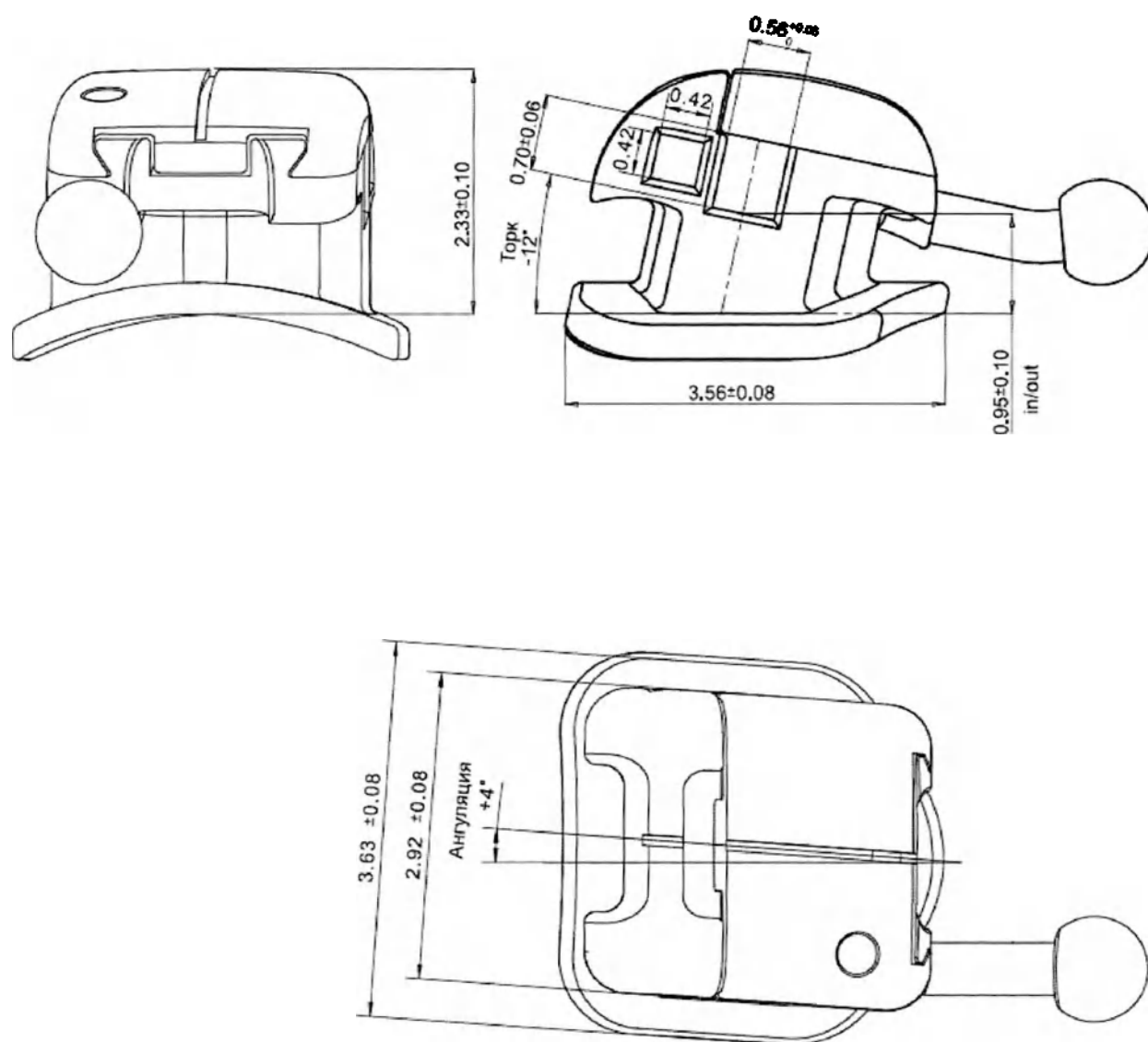


Рисунок 58. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 44 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-442(44)	-12	+4	0,095

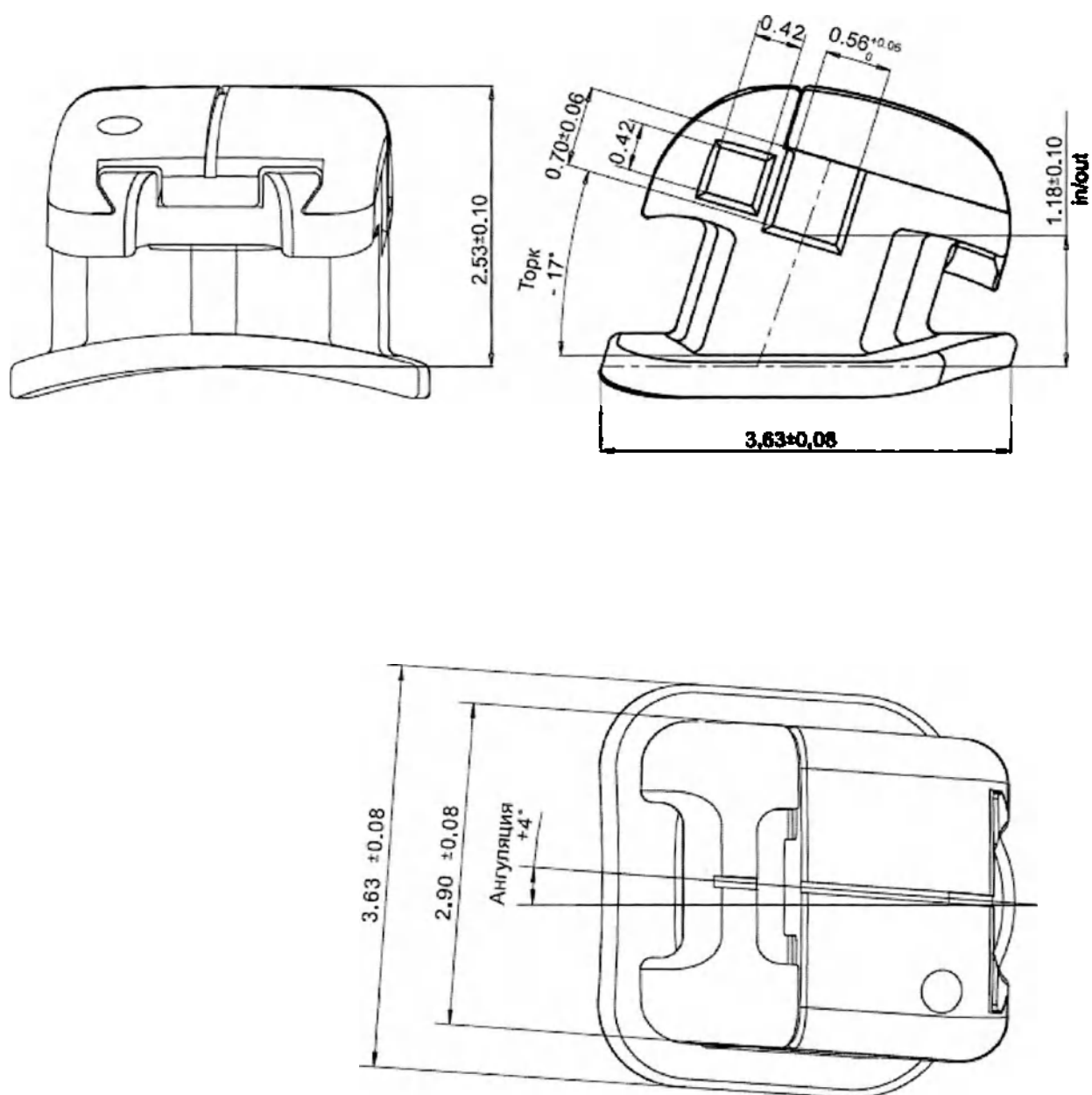


Рисунок 59. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Pro» на 45 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
12-452(45)	-17	+4	0,090

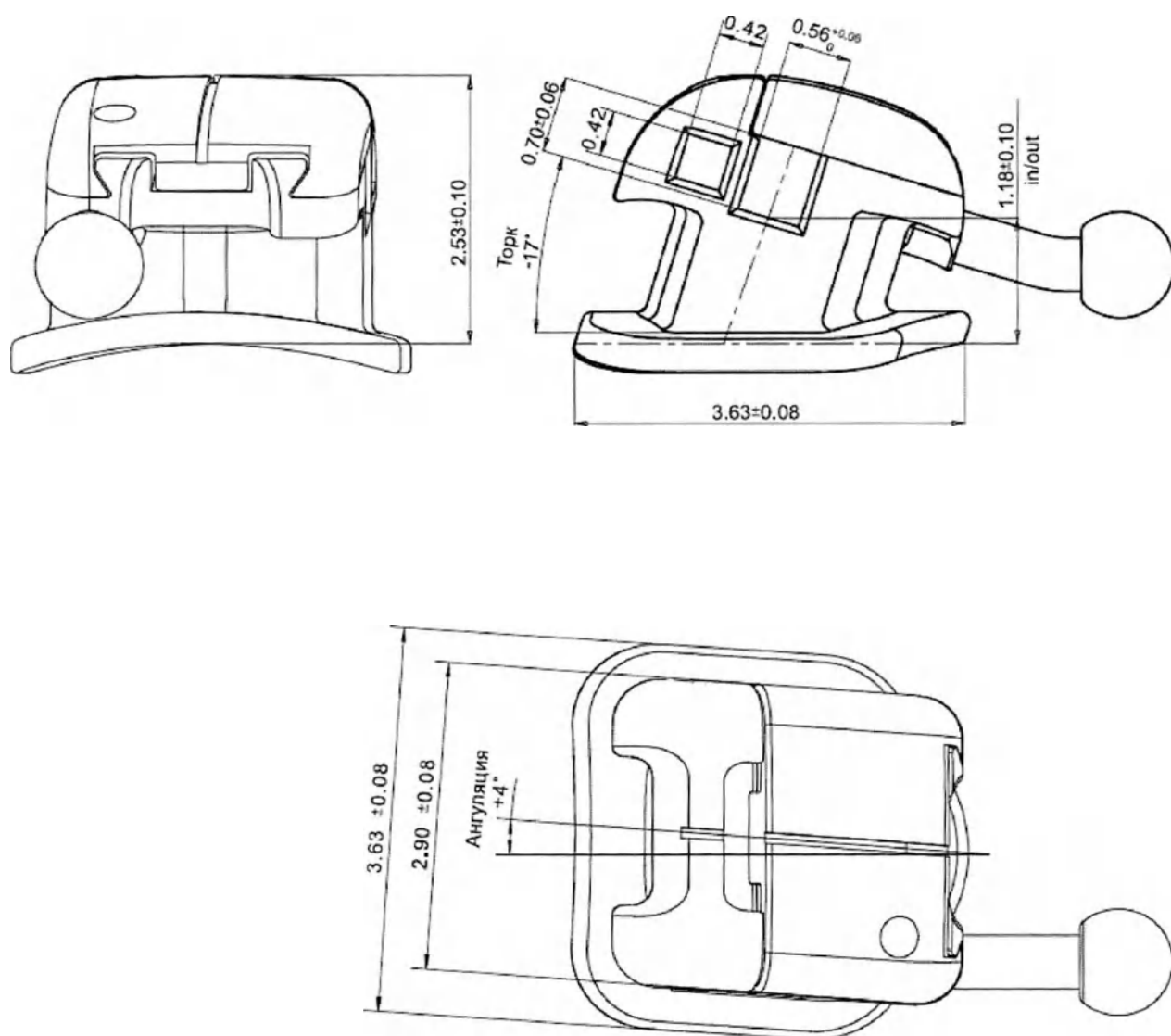


Рисунок 60. Бреккет металлический самолигирующий «NexStep Pro» на 45 зуб, с крючком, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
11-452(45)	-17	+4	0,095

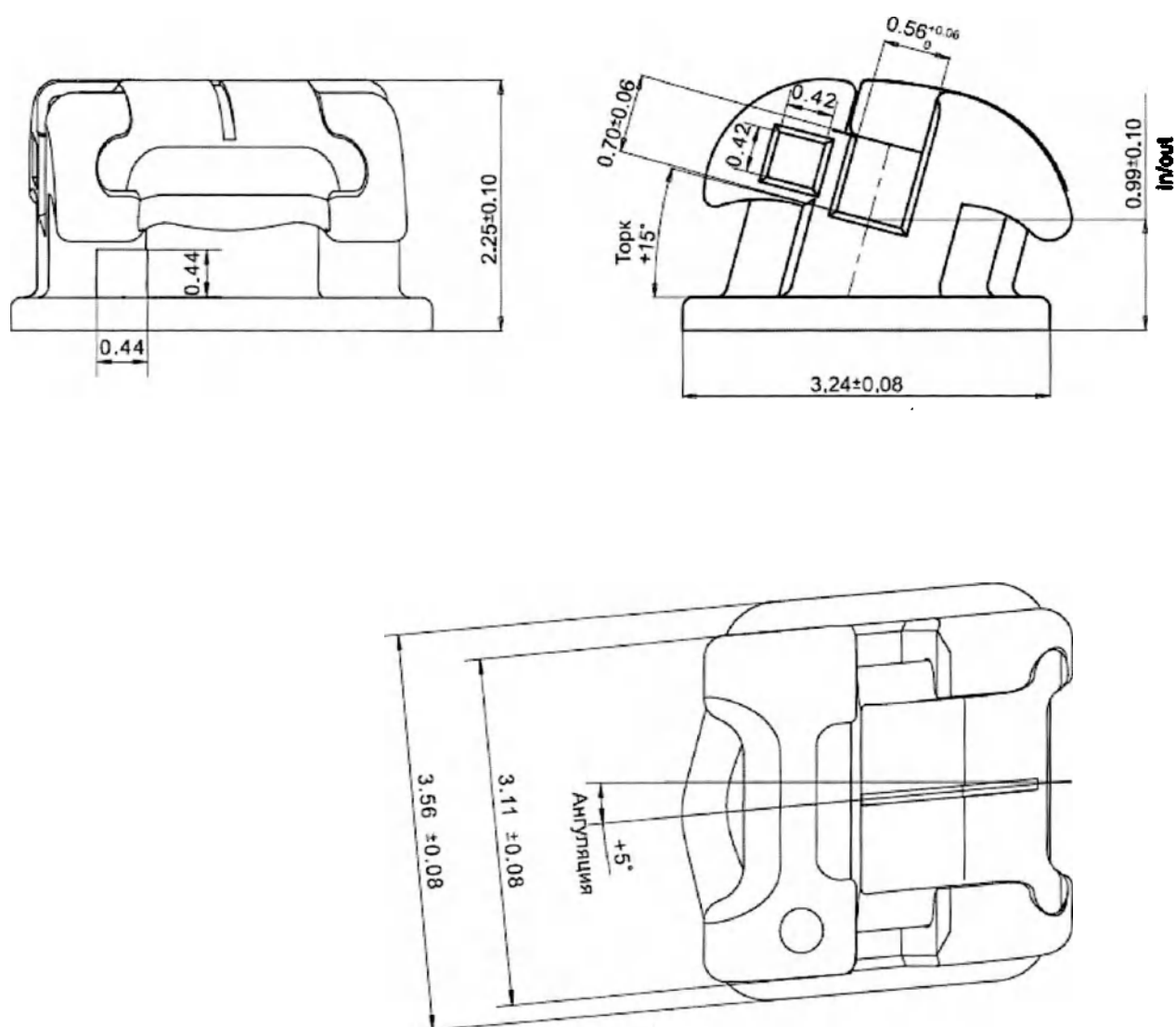


Рисунок 61. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 11 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-112(11)	+15	+5	0,090

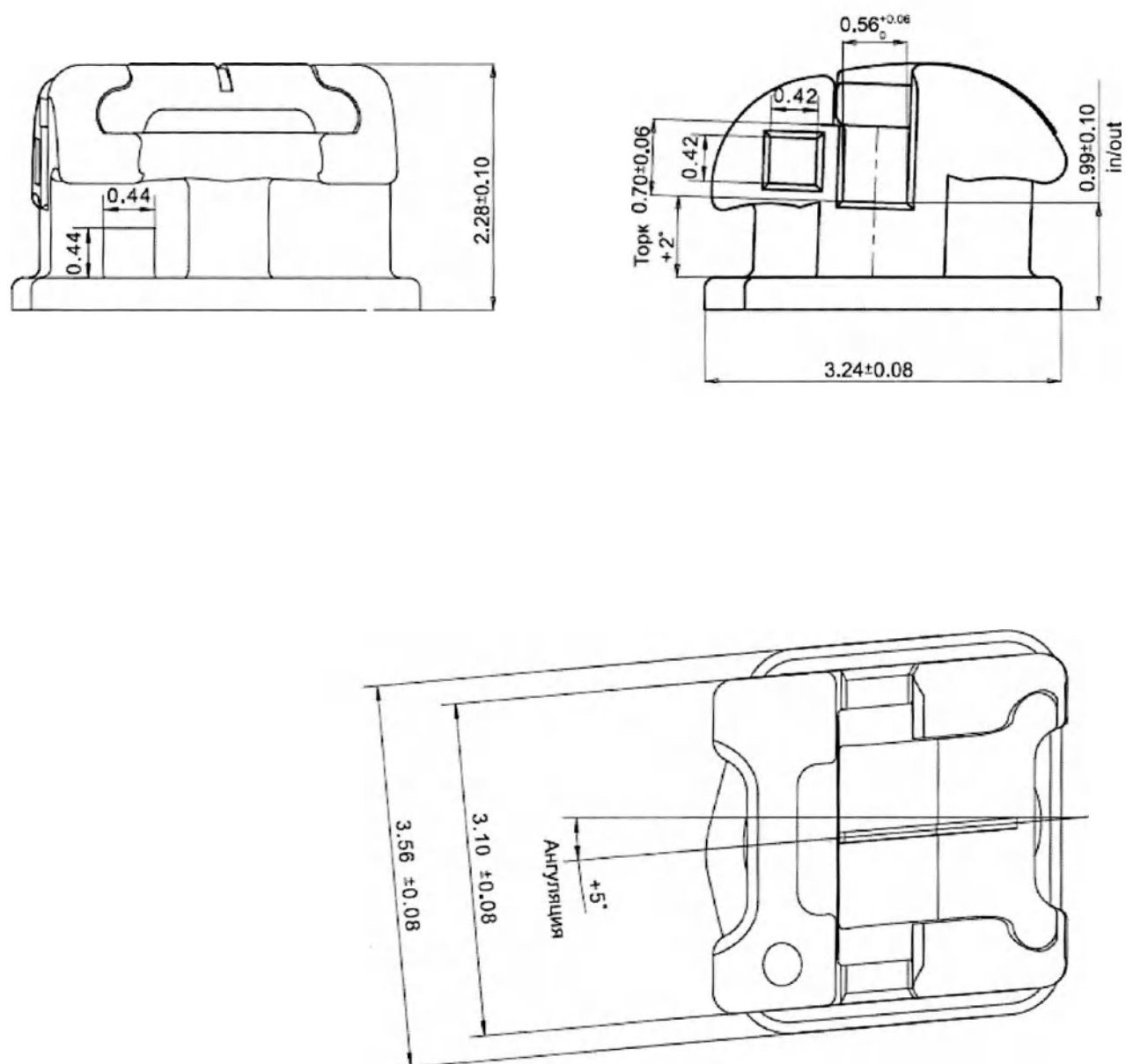


Рисунок 62. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 11 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-111(11)	+2	+5	0,090

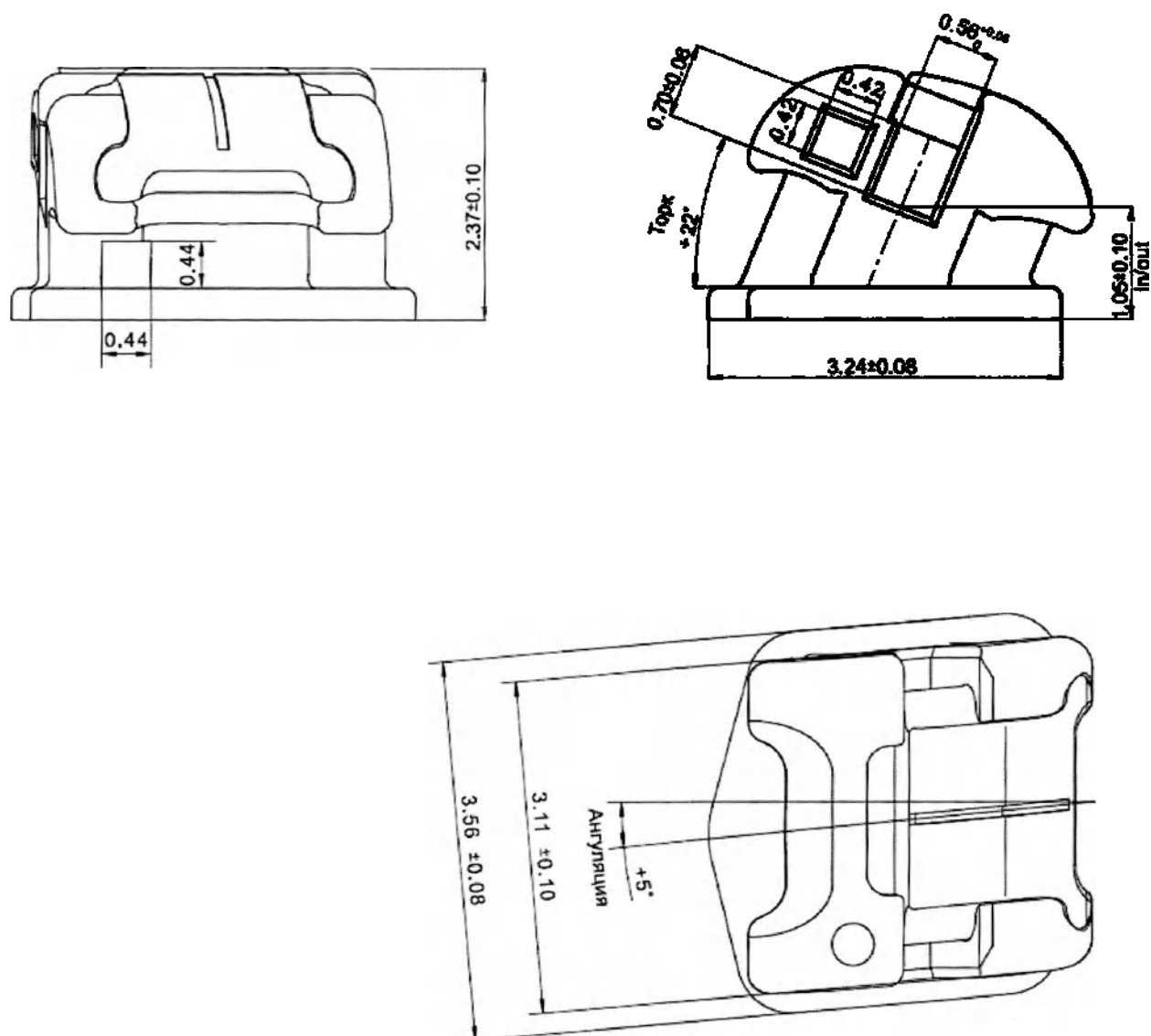


Рисунок 63. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 11 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-113(11)	+22	+5	0,090

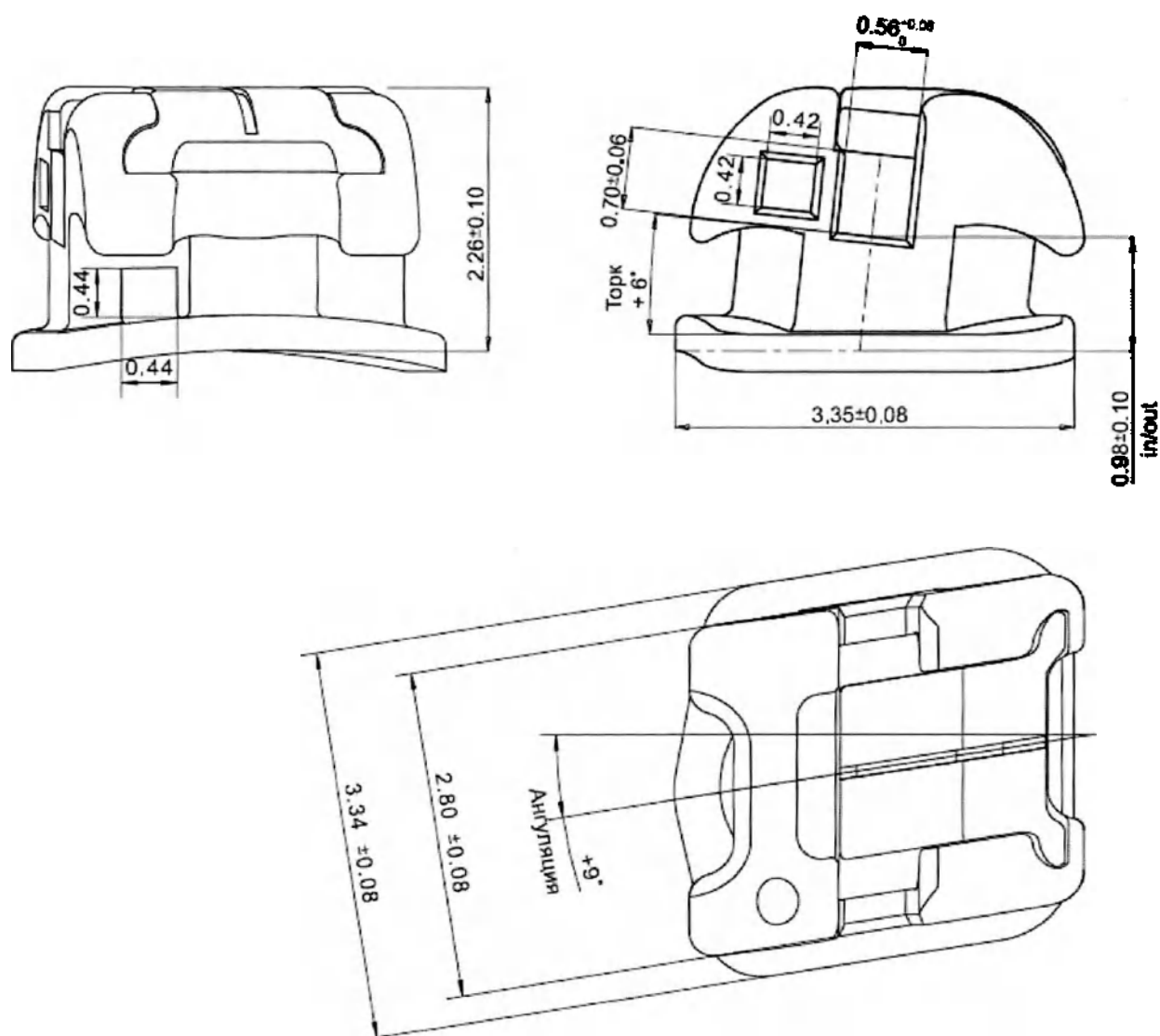


Рисунок 64. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Q» на 12 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-122(12)	+6	+9	0,090

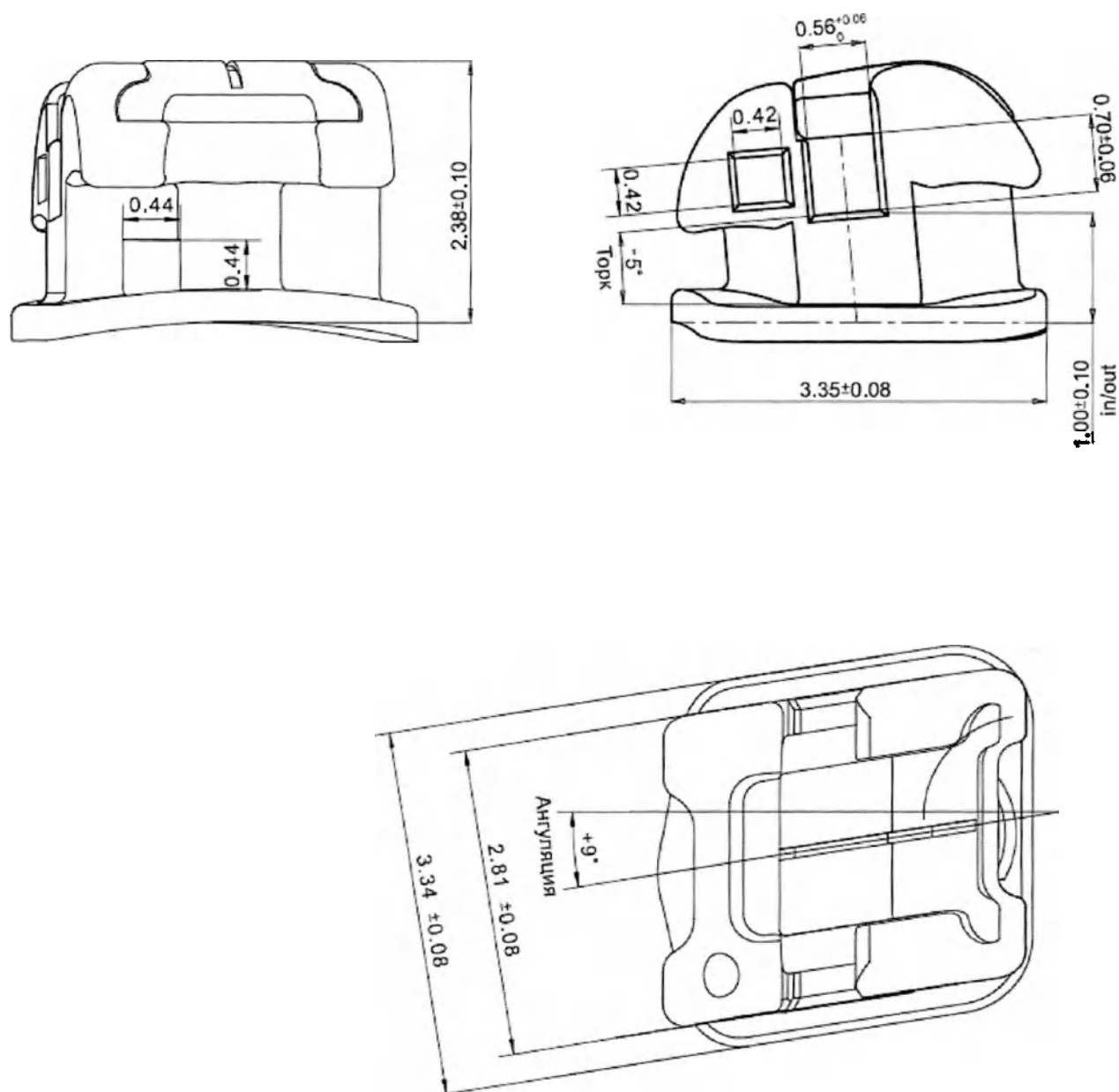


Рисунок 65. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 12 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-121(12)	-5	+9	0,090

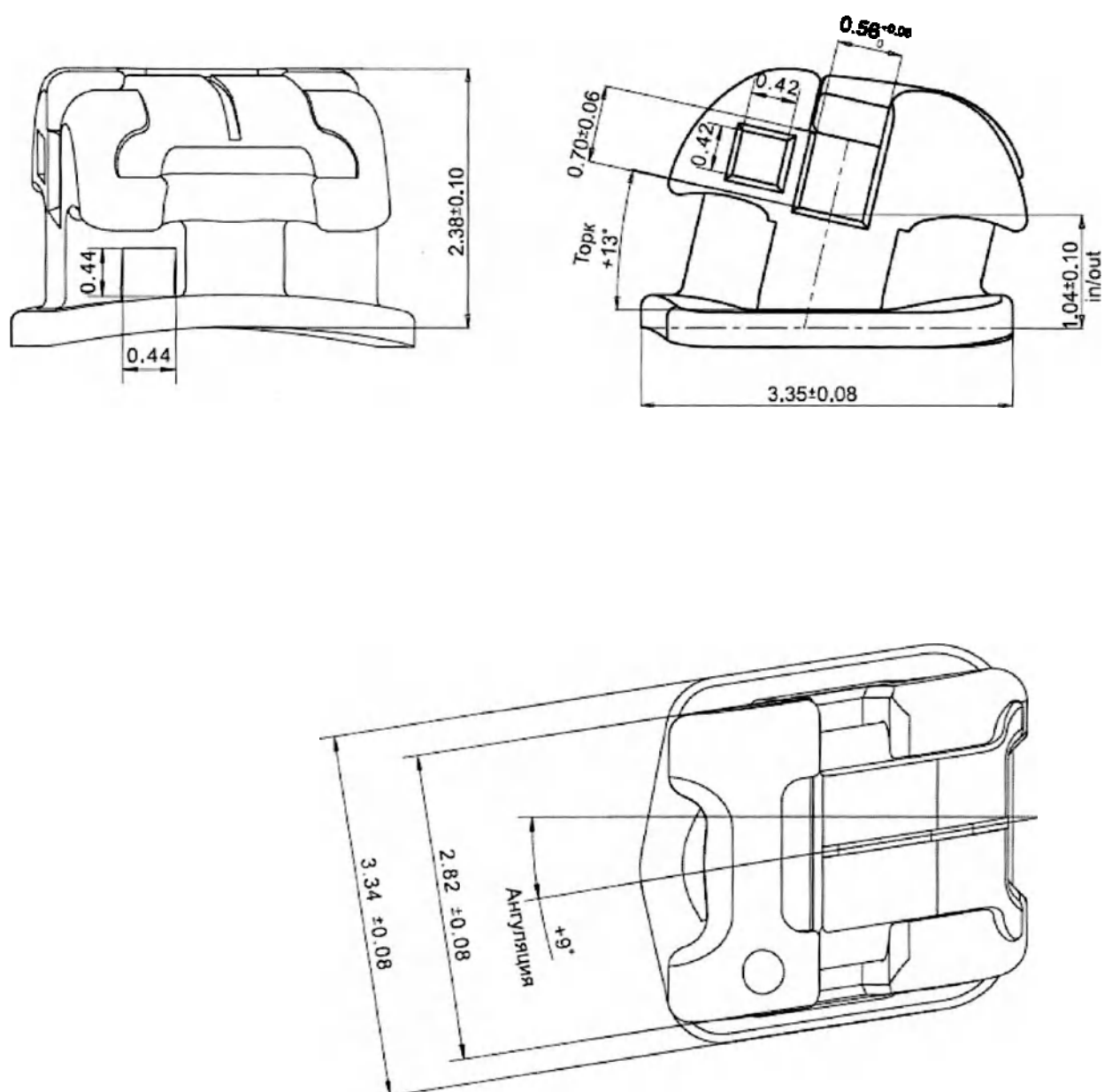


Рисунок 66. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 12 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-123(12)	+13	+9	0,090

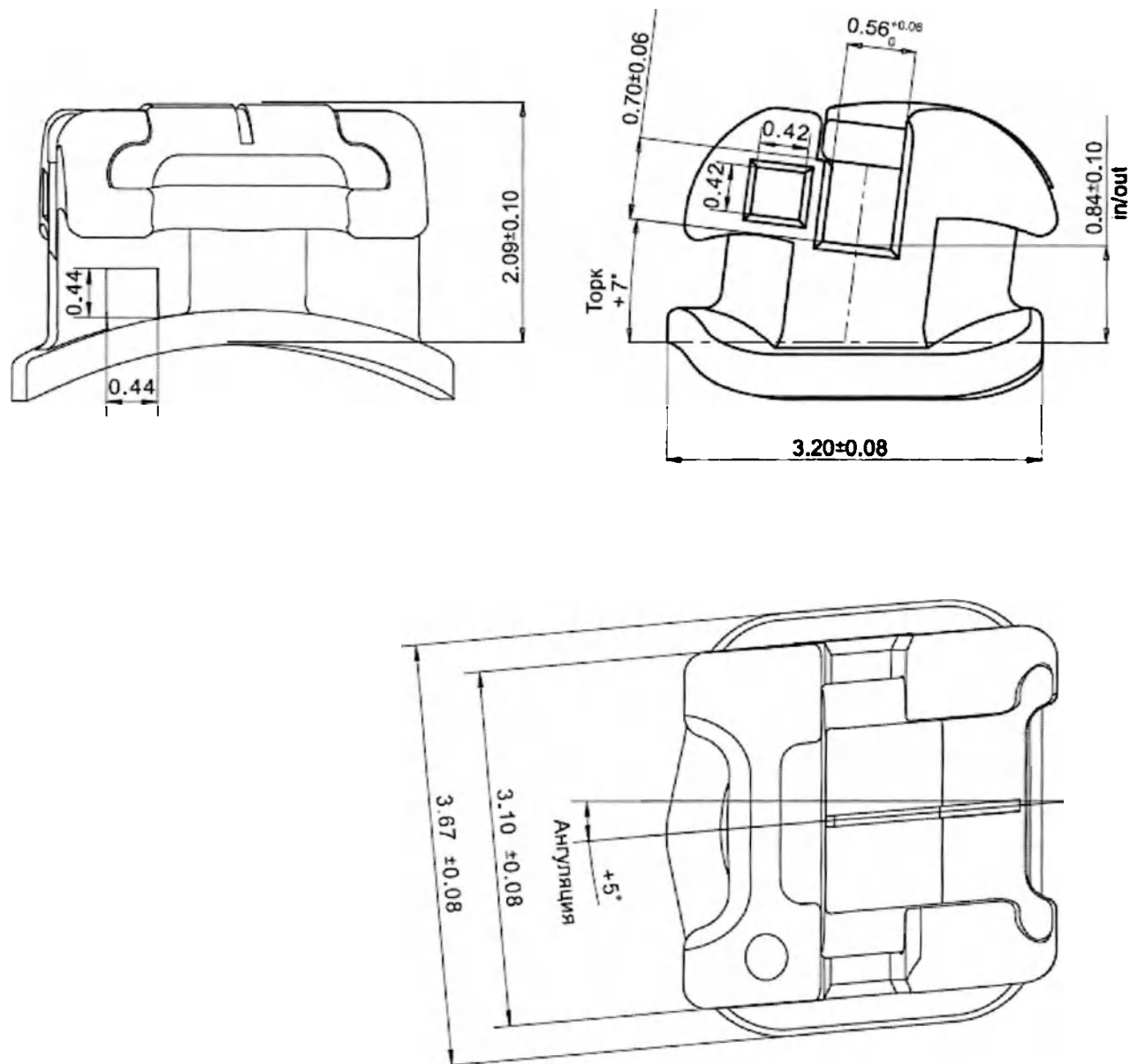


Рисунок 67. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 13 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-132(13)	+7	+5	0,090

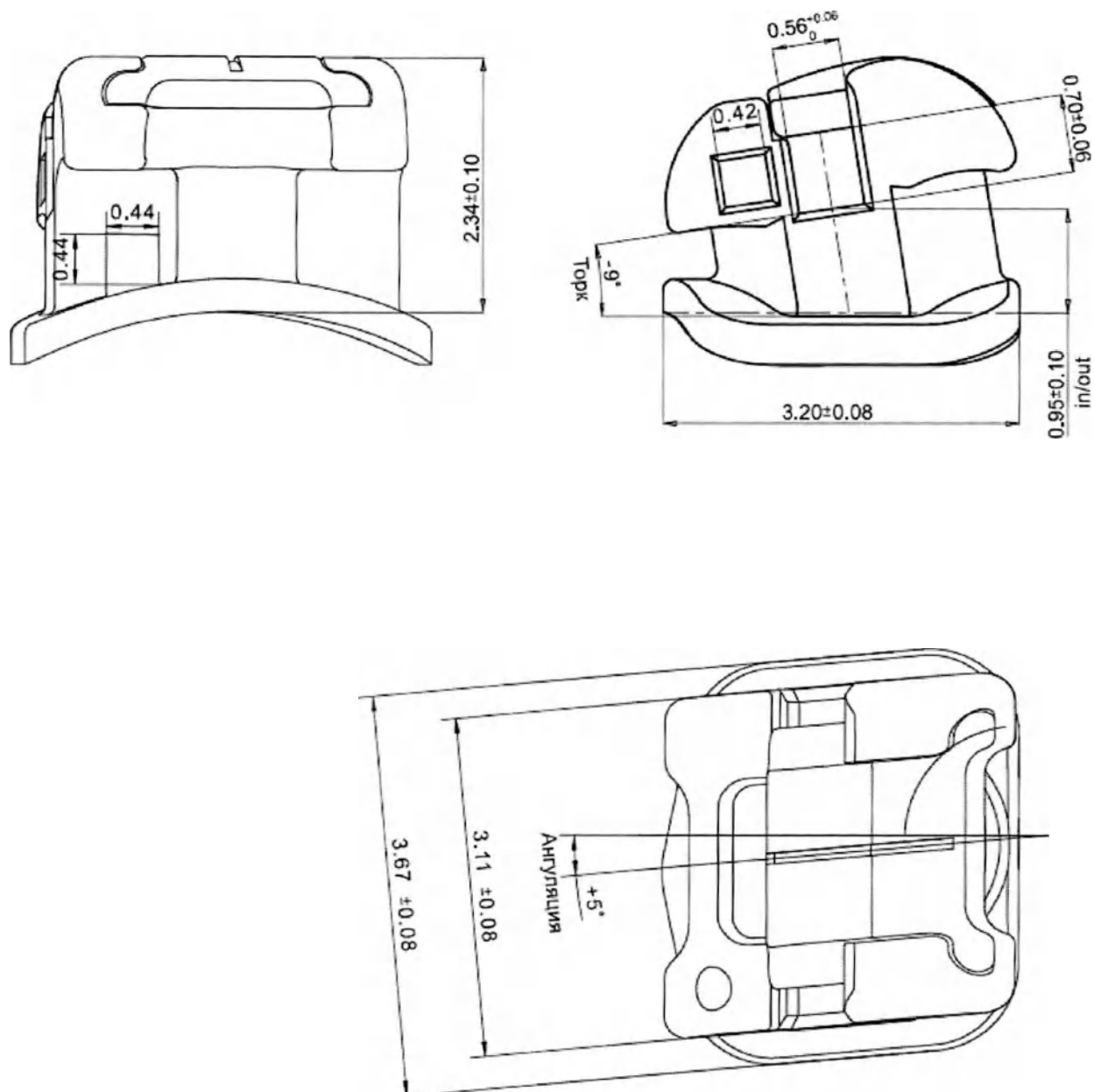


Рисунок 68. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 13 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-131(13)	-9	+5	0,090

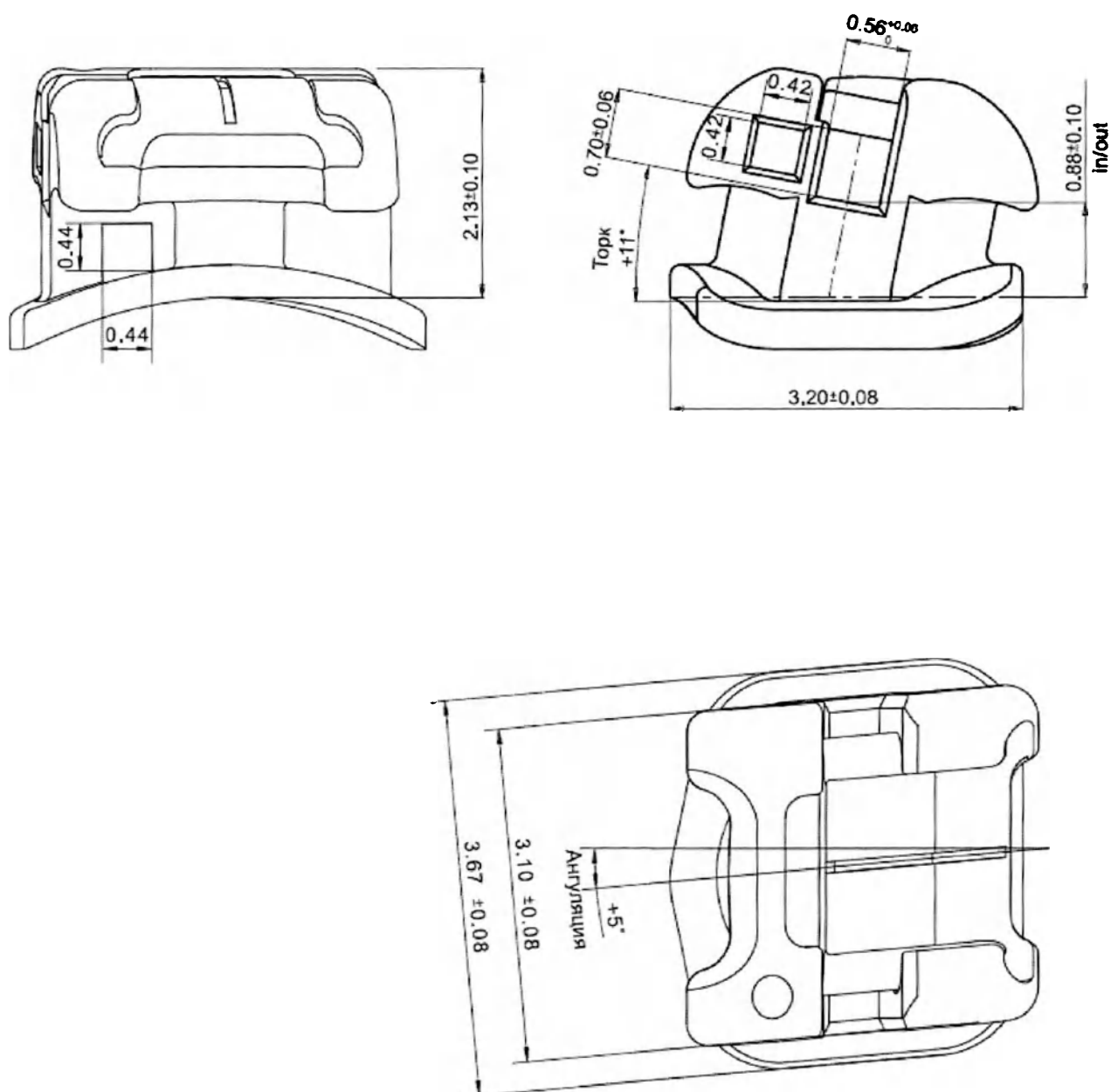


Рисунок 69. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 13 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-133(13)	+11	+5	0,090

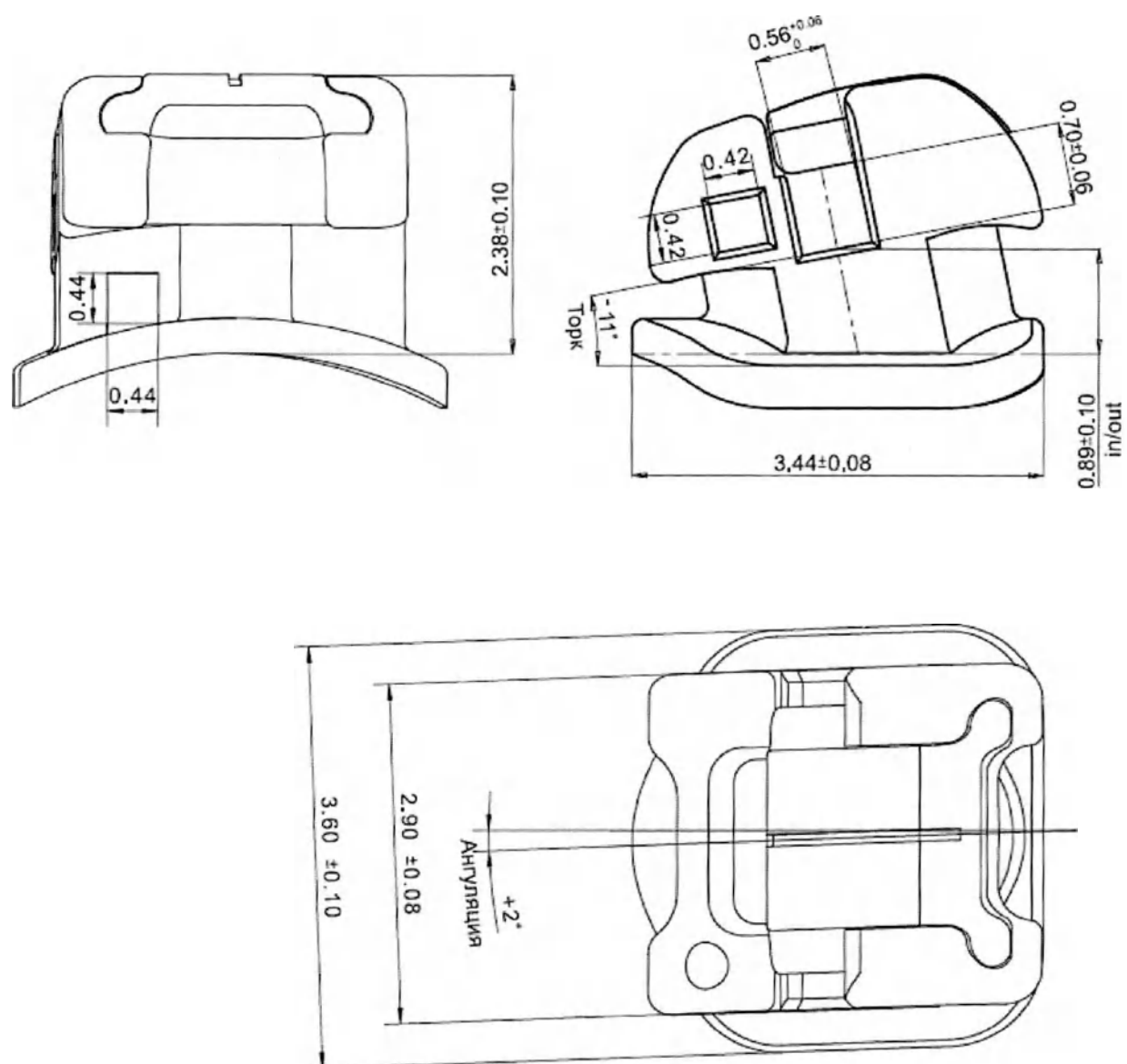


Рисунок 70. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 14 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-142(14)	-11	+2	0,090

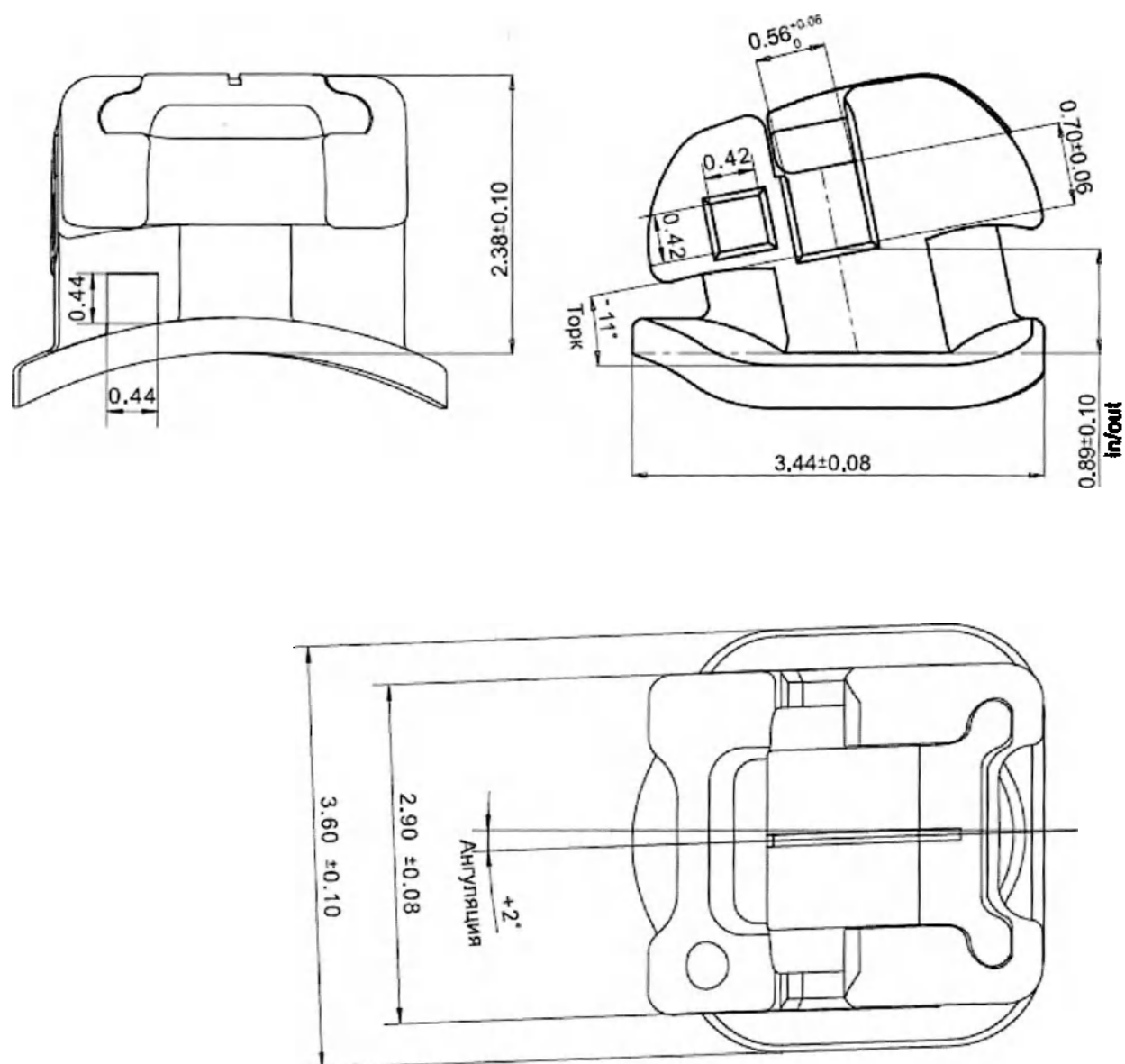


Рисунок 71. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 15 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-152(15)	-11	+2	0,090

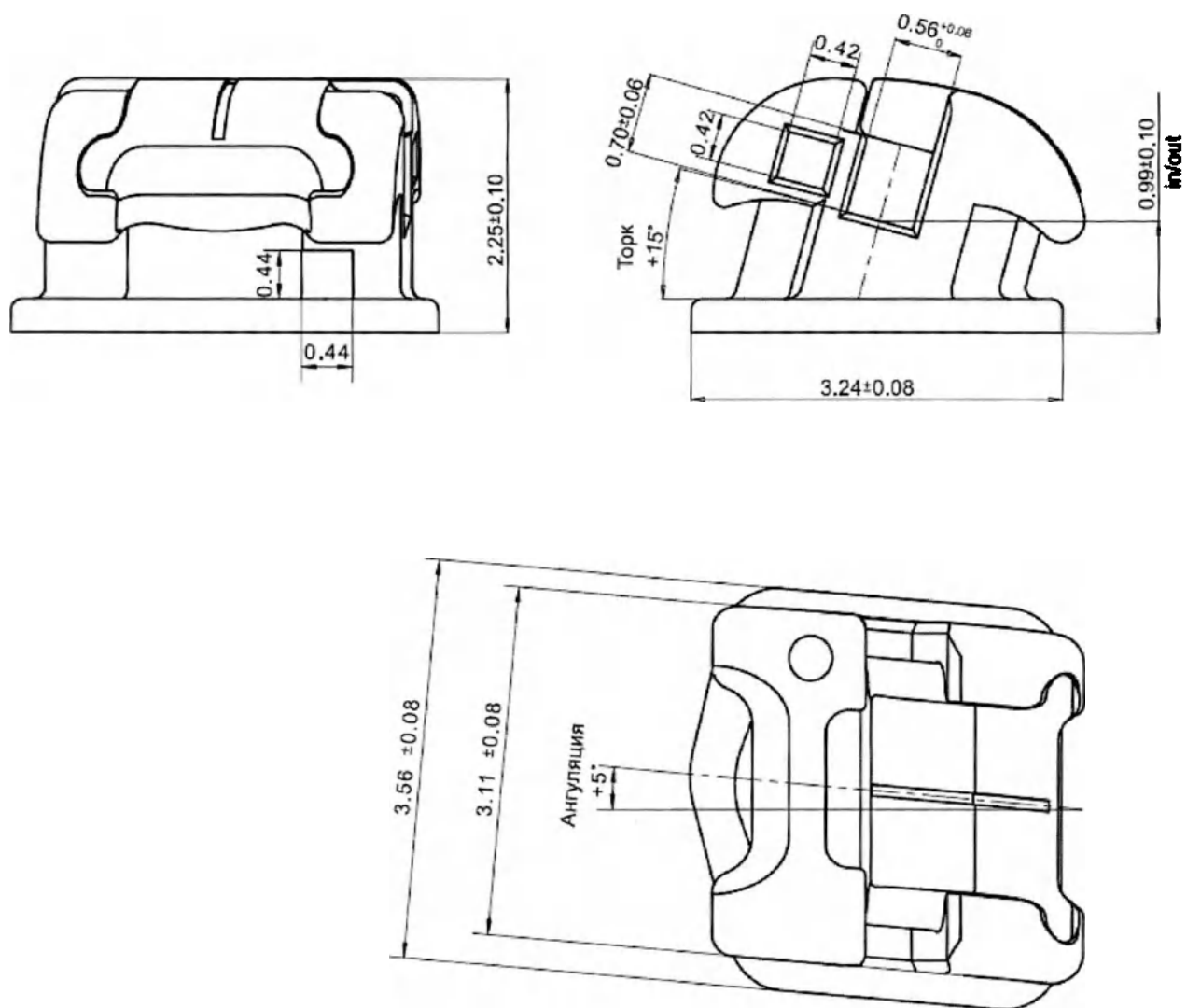


Рисунок 72. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 21 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-212(21)	+15	+5	0,090

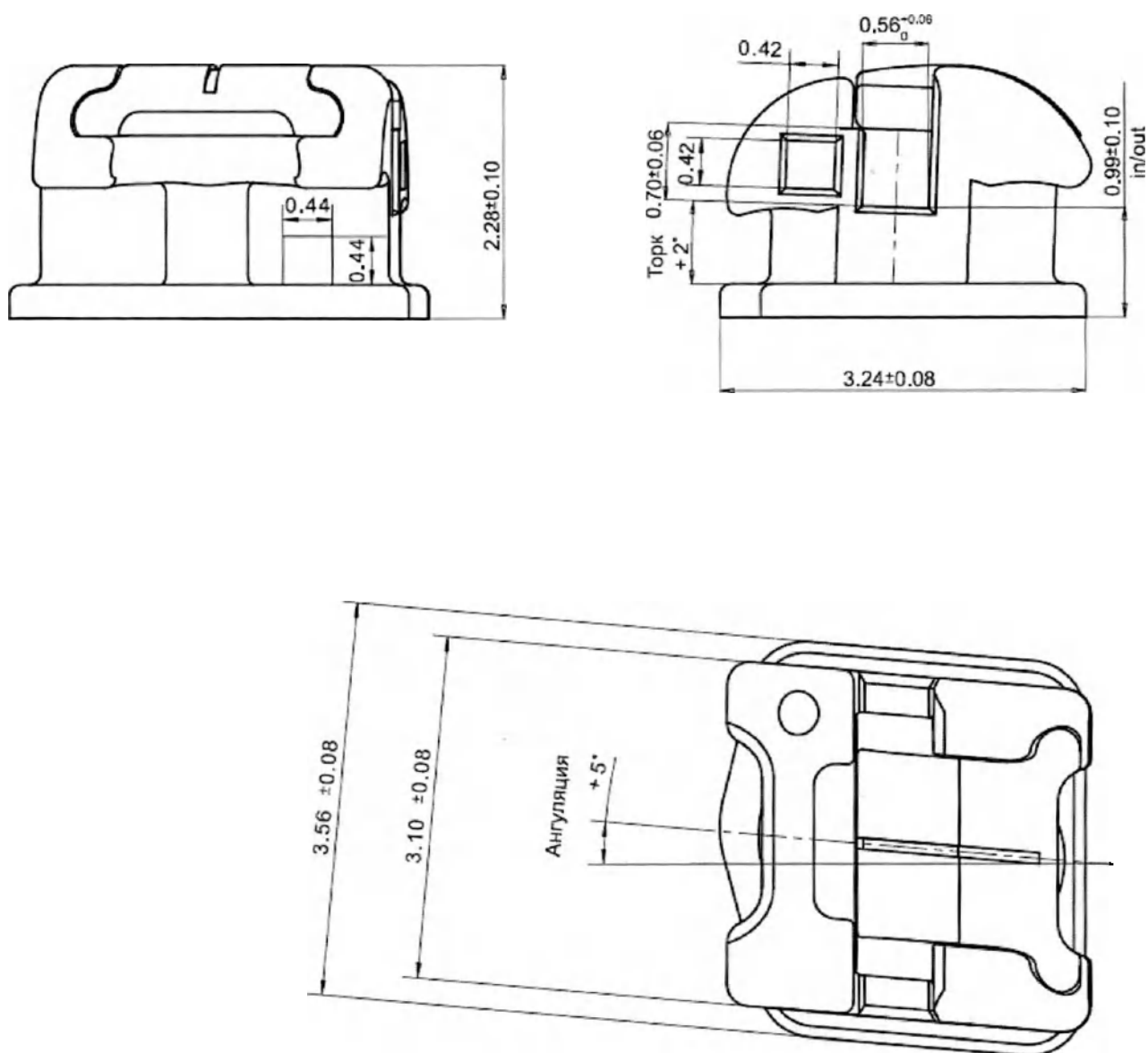


Рисунок 73. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 21 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-211(21)	+2	+5	0,090

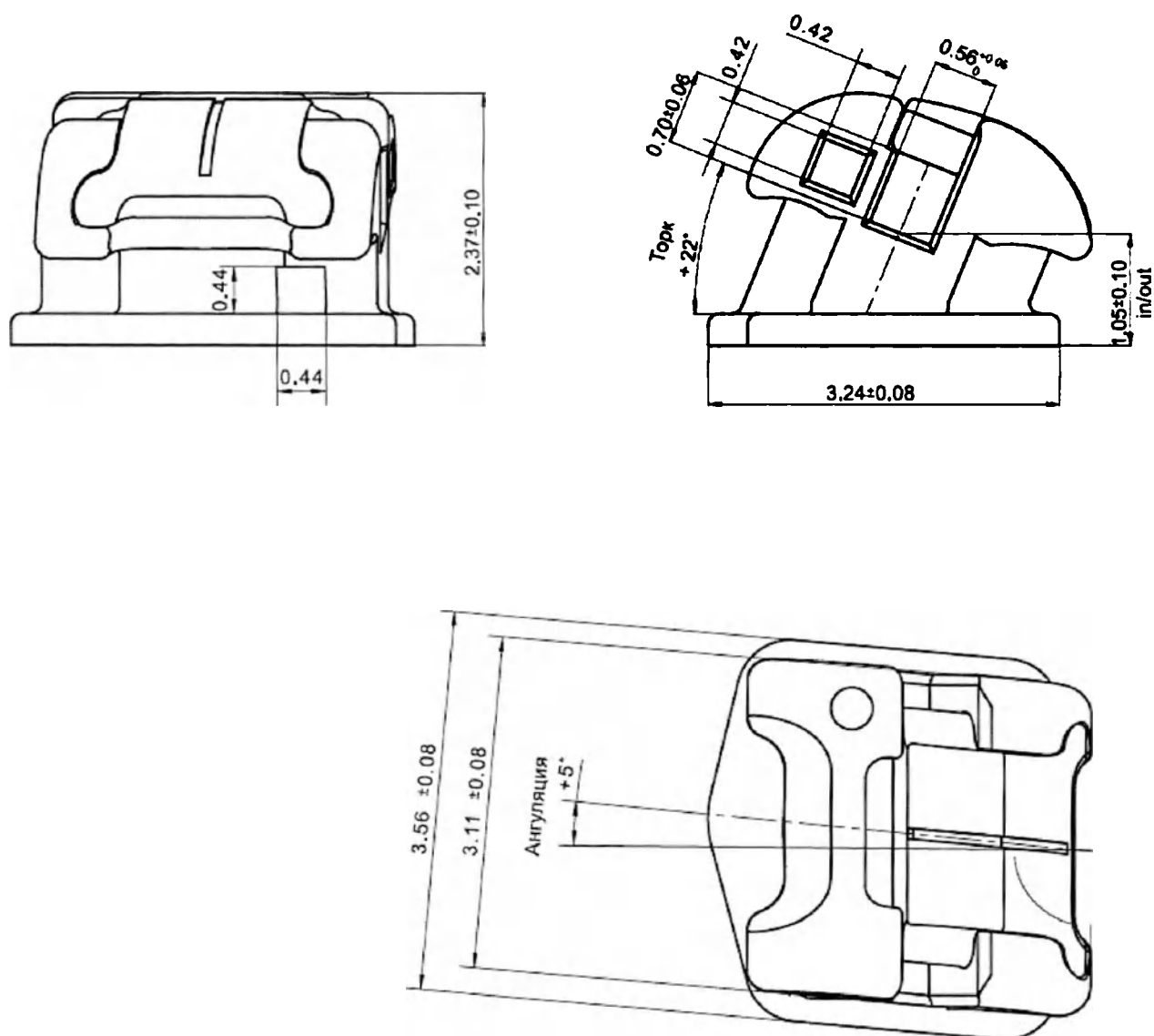


Рисунок 74. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 21 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-213(21)	+22	+5	0,090

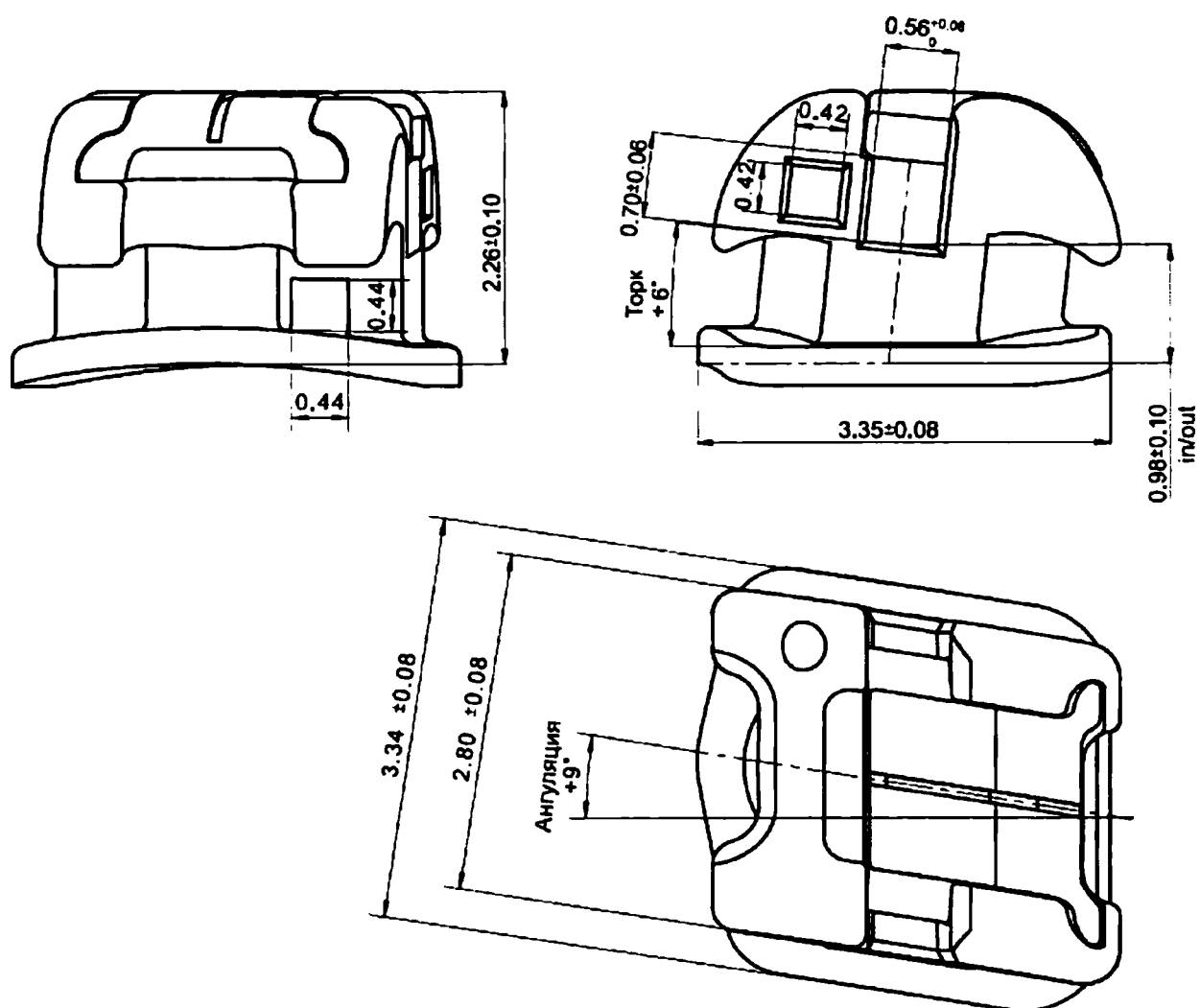


Рисунок 75. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 22 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-222(22)	+6	+9	0,090

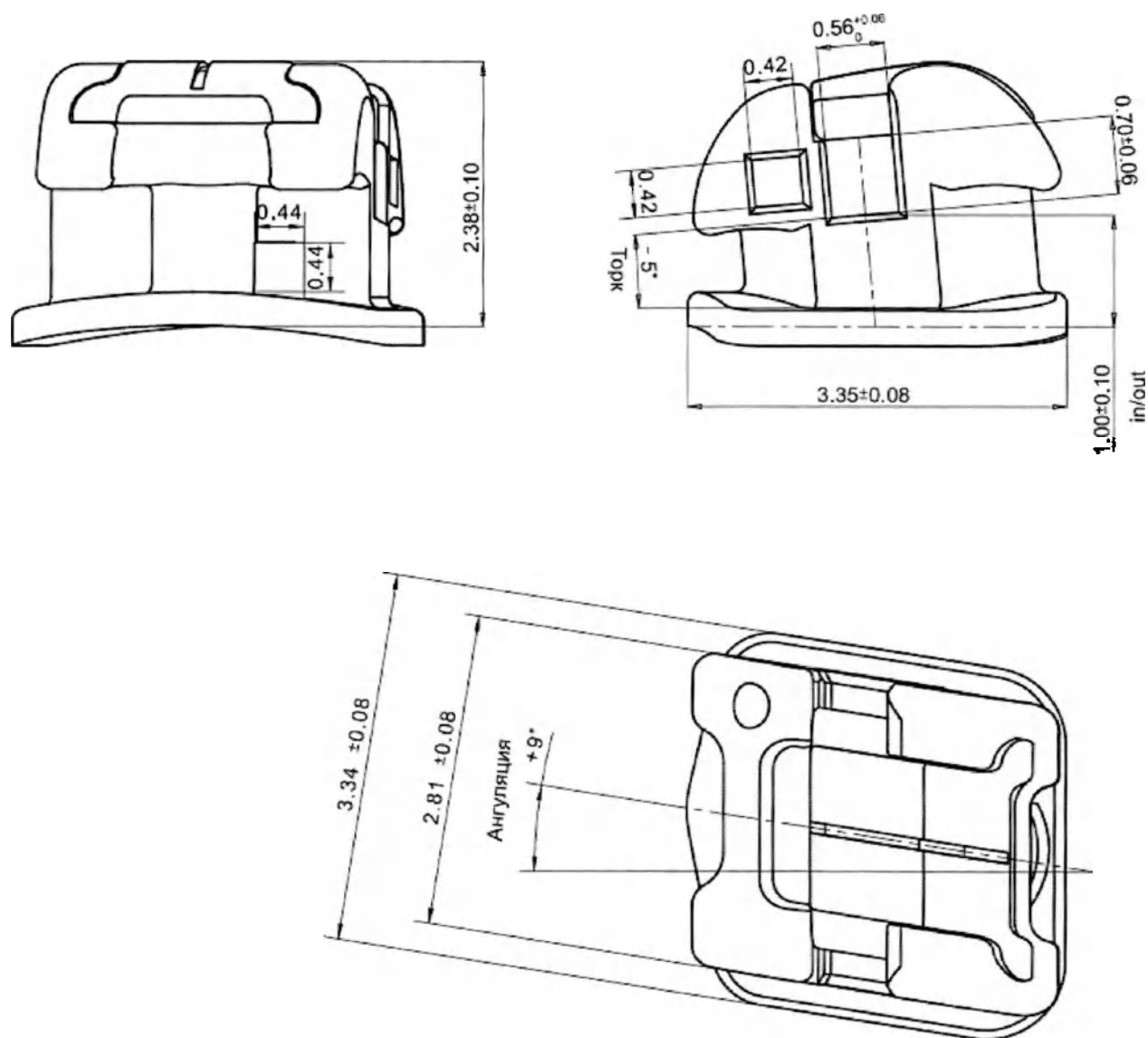


Рисунок 76. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 22 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-221(22)	-5	+9	0,090

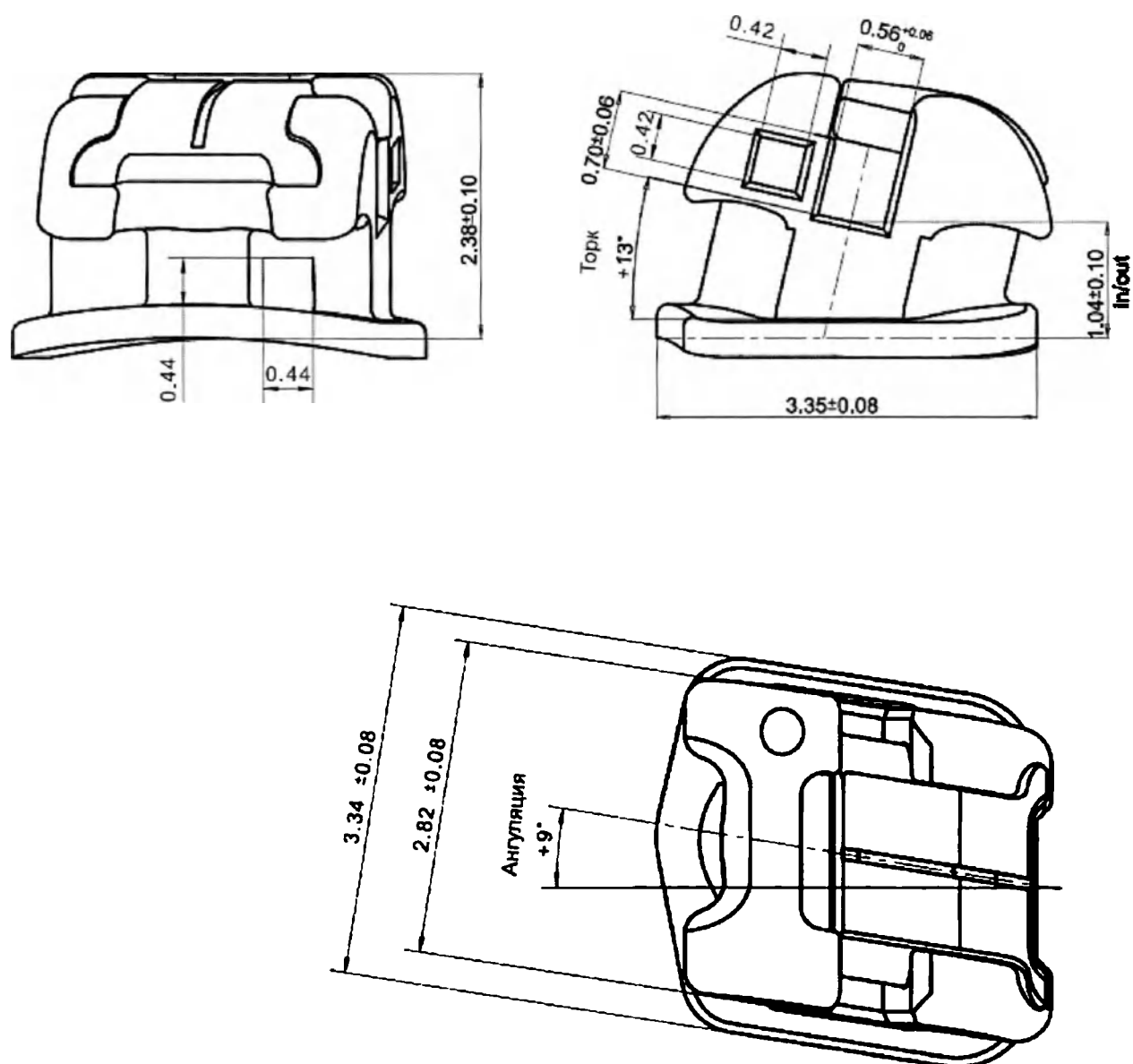


Рисунок 77. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 22 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-223(22)	+13	+9	0,090

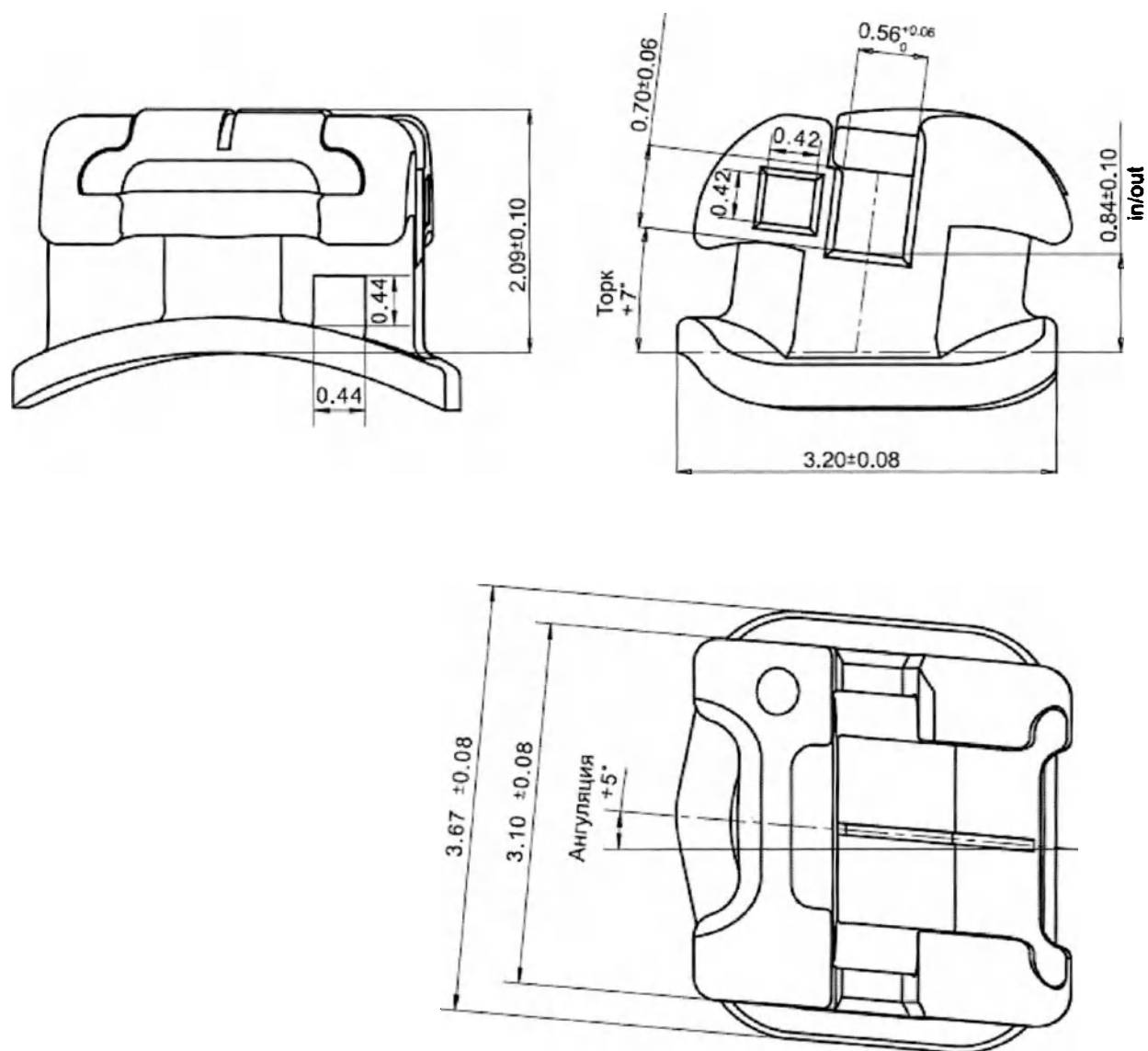


Рисунок 78. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 23 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-232(23)	+7	+5	0,090

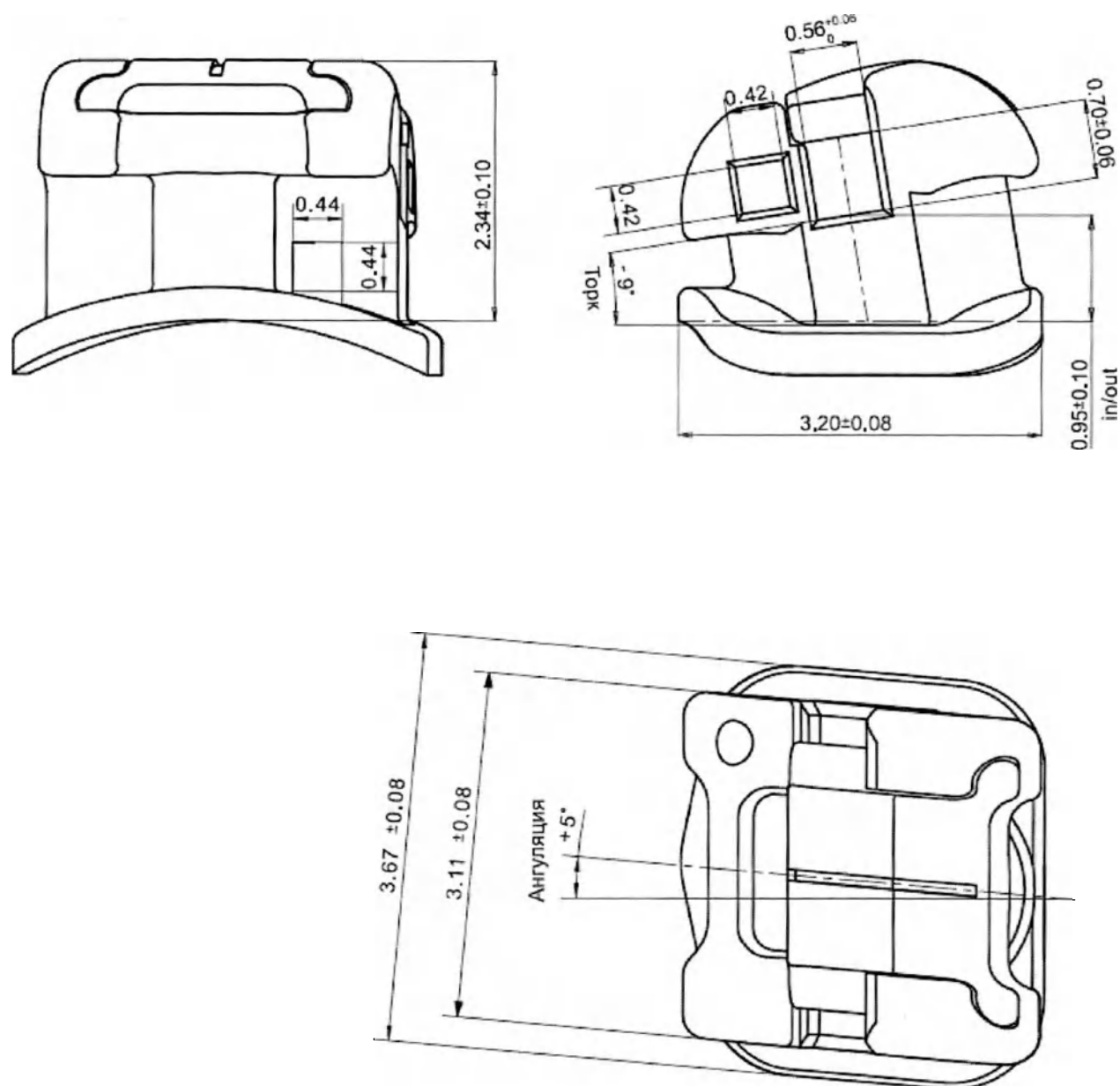


Рисунок 79. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 23 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-231(23)	-9	+5	0,090

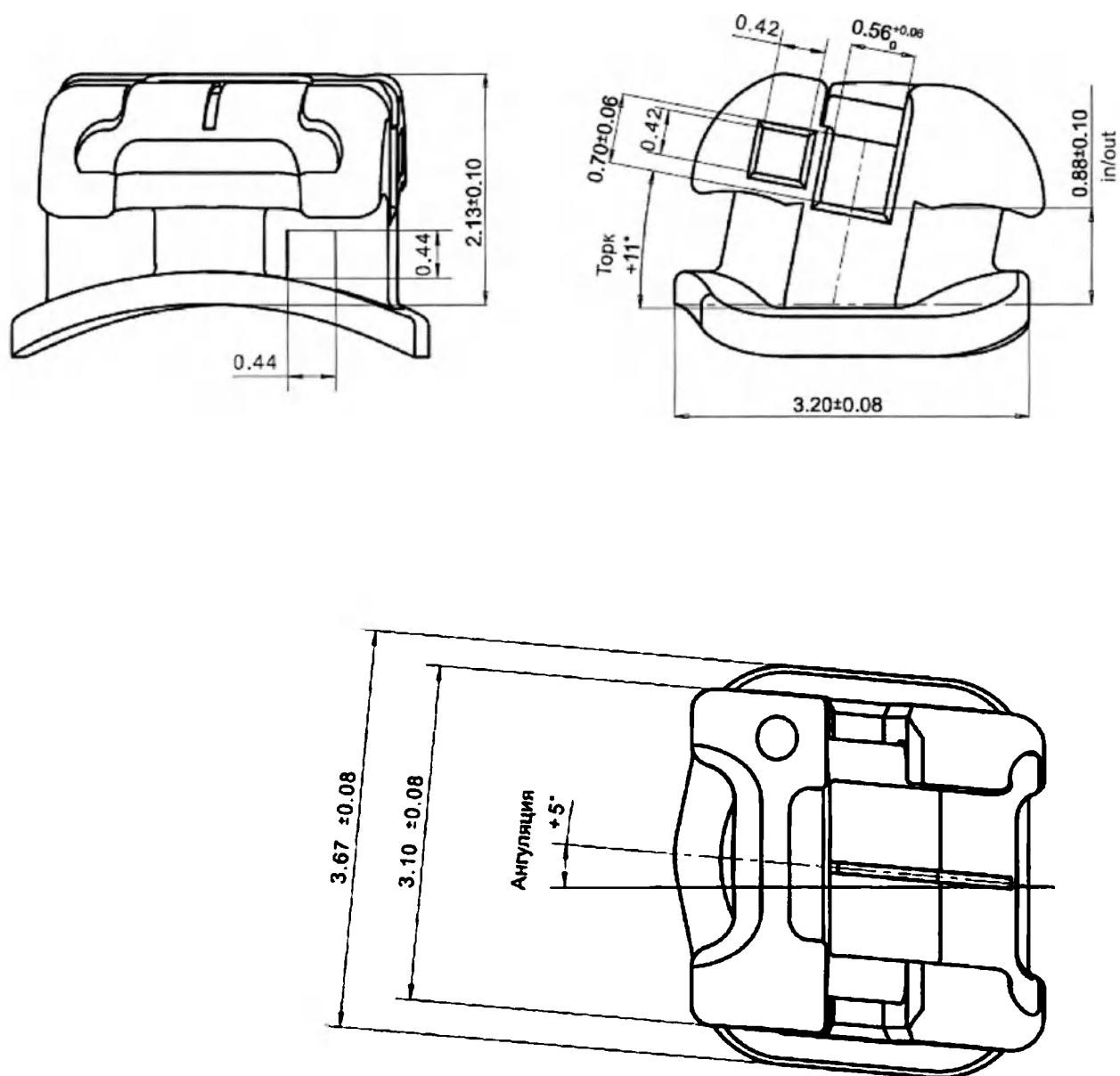


Рисунок 80. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 23 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-233(23)	+11	+5	0,090

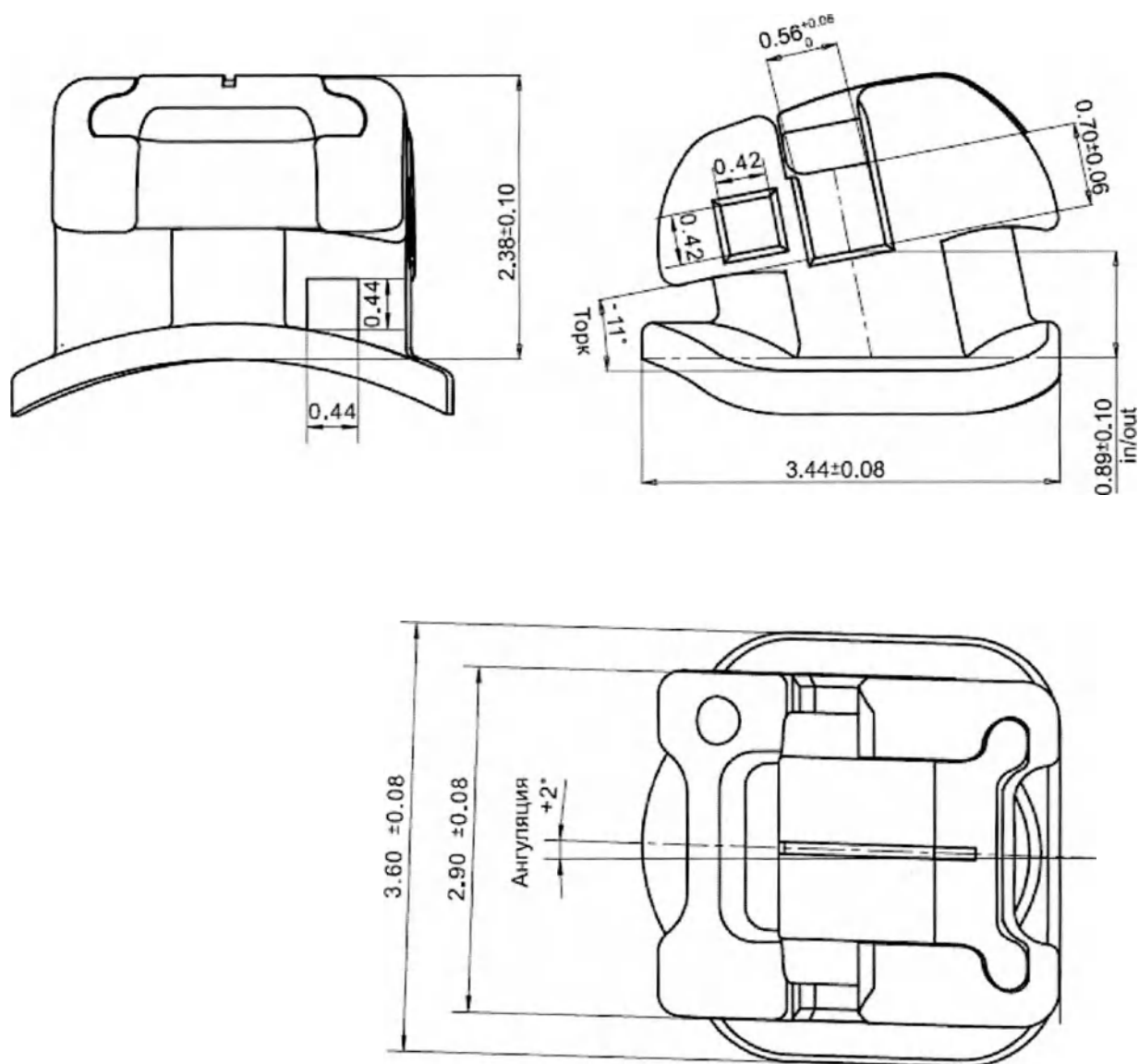


Рисунок 81. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 24 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-242(24)	-11	+2	0,090

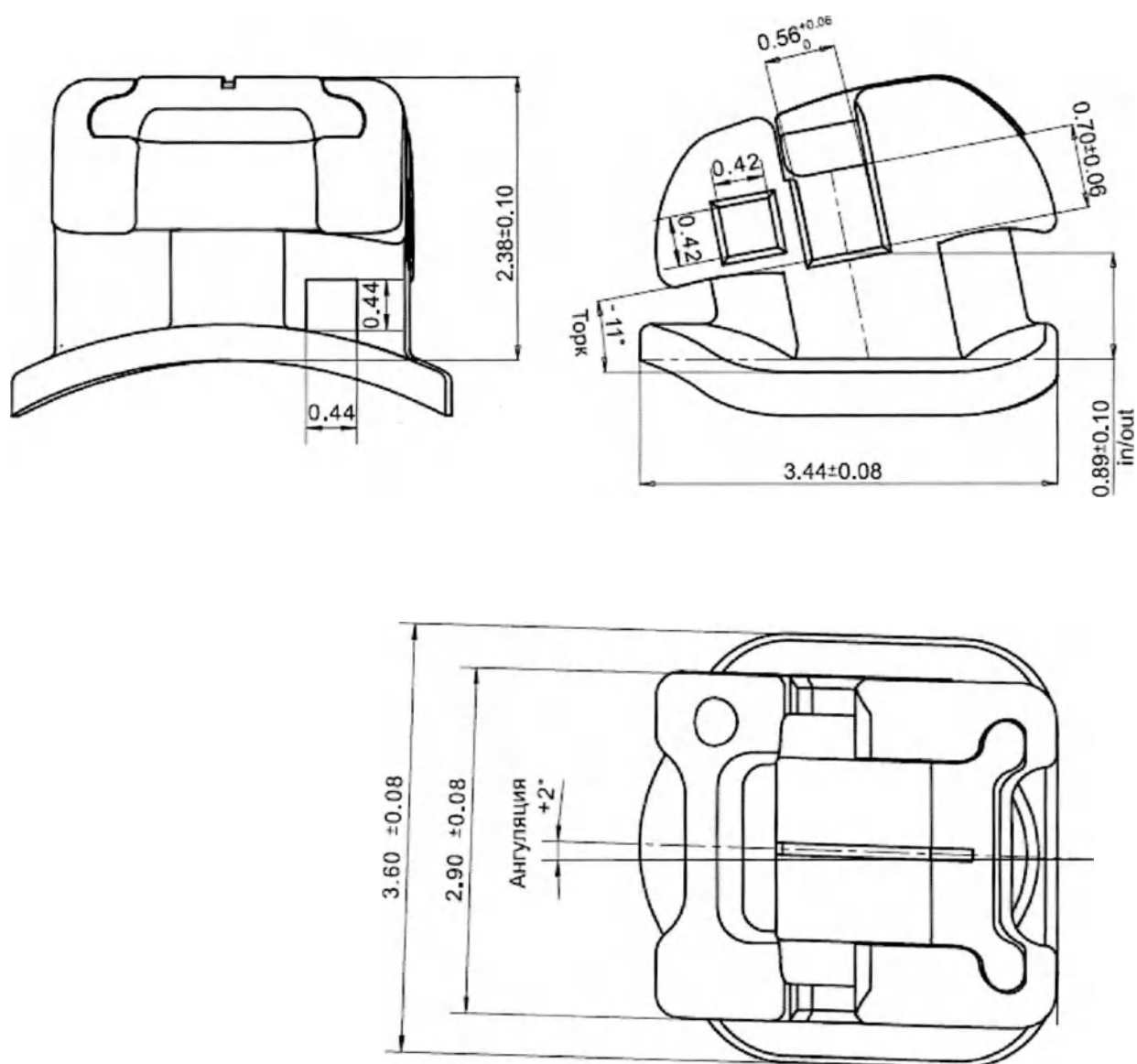


Рисунок 82. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 25 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-252(25)	-11	+2	0,090

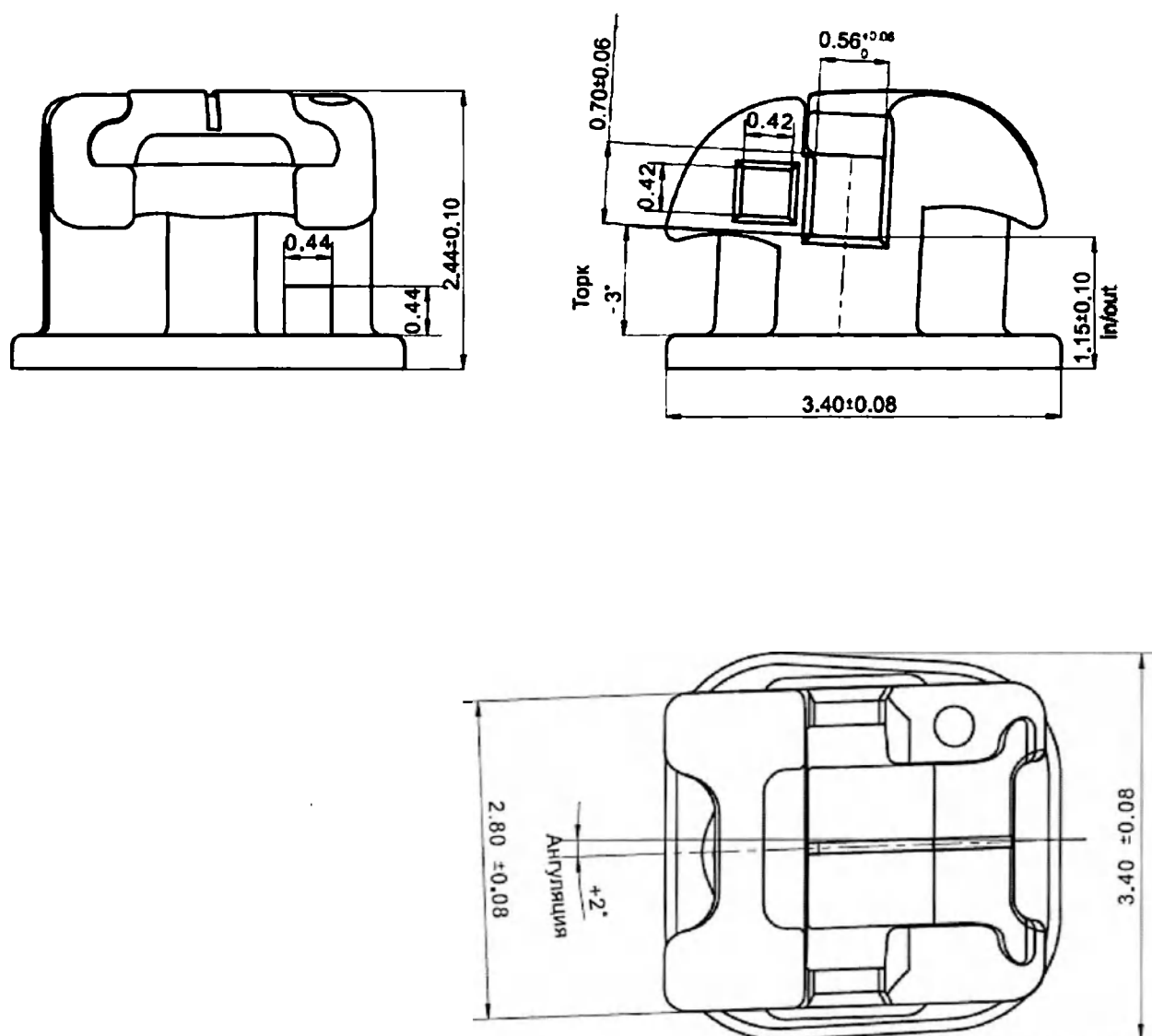


Рисунок 83. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 31 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-312(31)	-3	+2	0,090

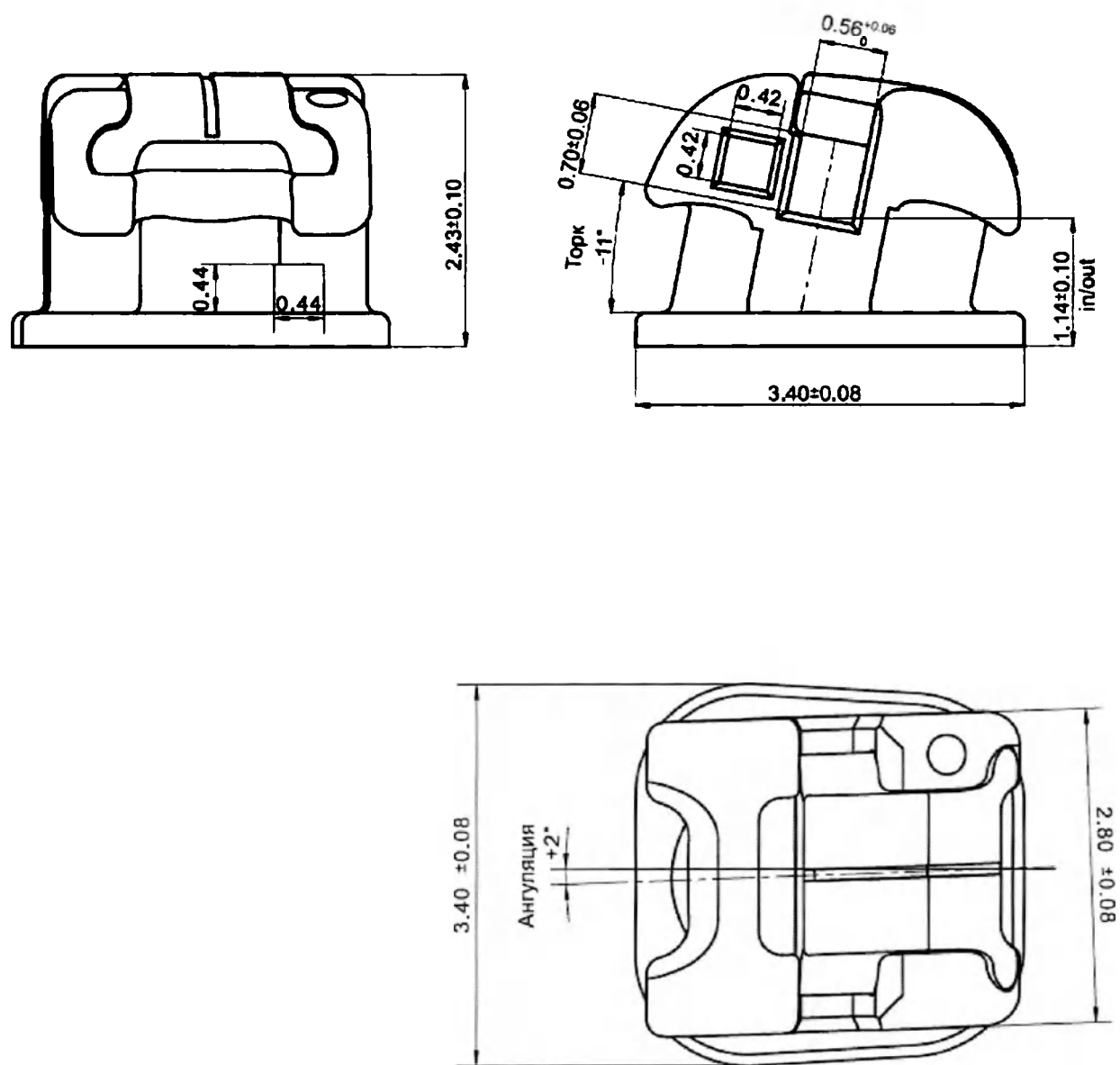


Рисунок 84. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 31 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-311(31)	-11	+2	0,090

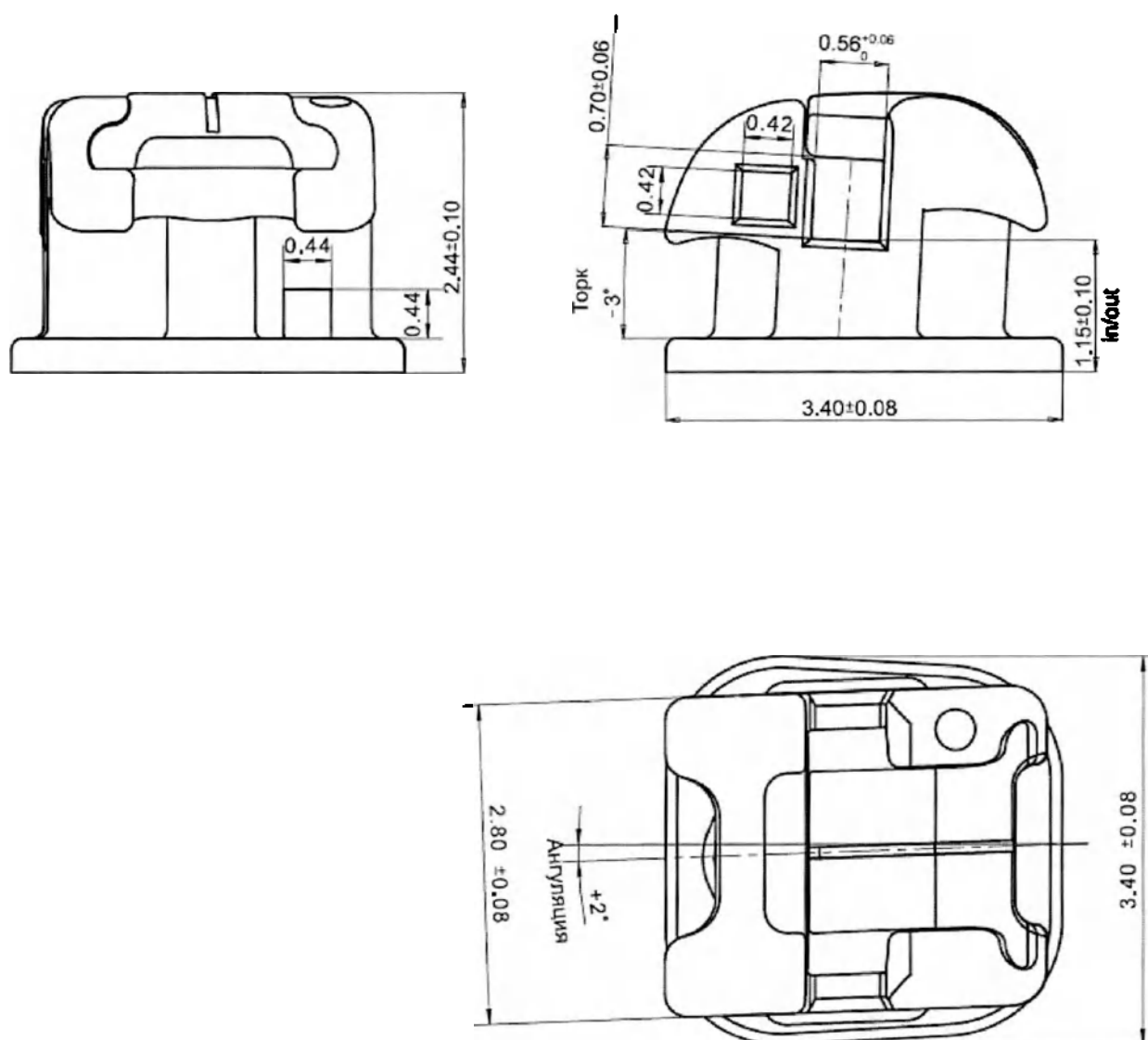


Рисунок 85. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 32 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-322(32)	-3	+2	0,090

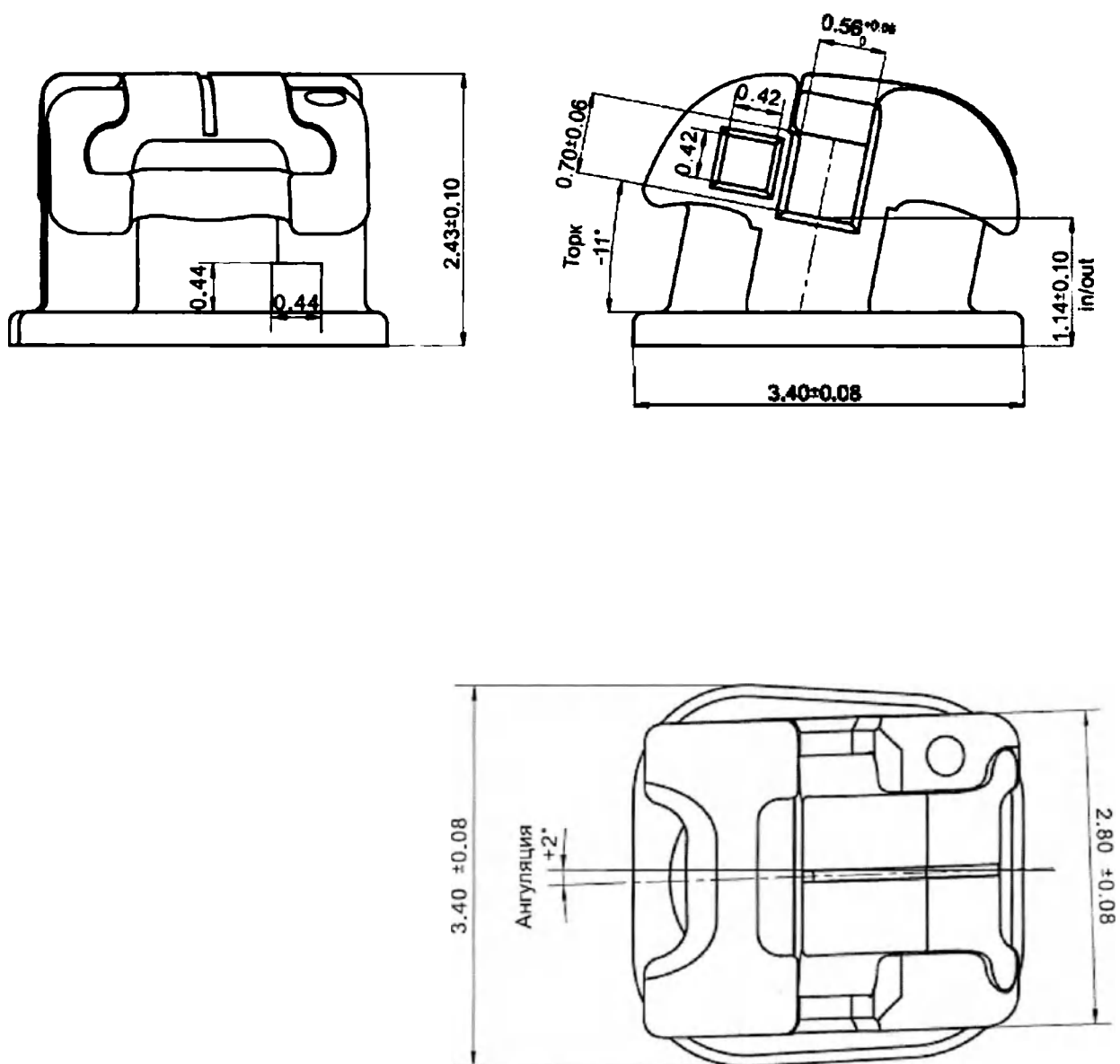


Рисунок 86. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 32 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-321(32)	-11	+2	0,090

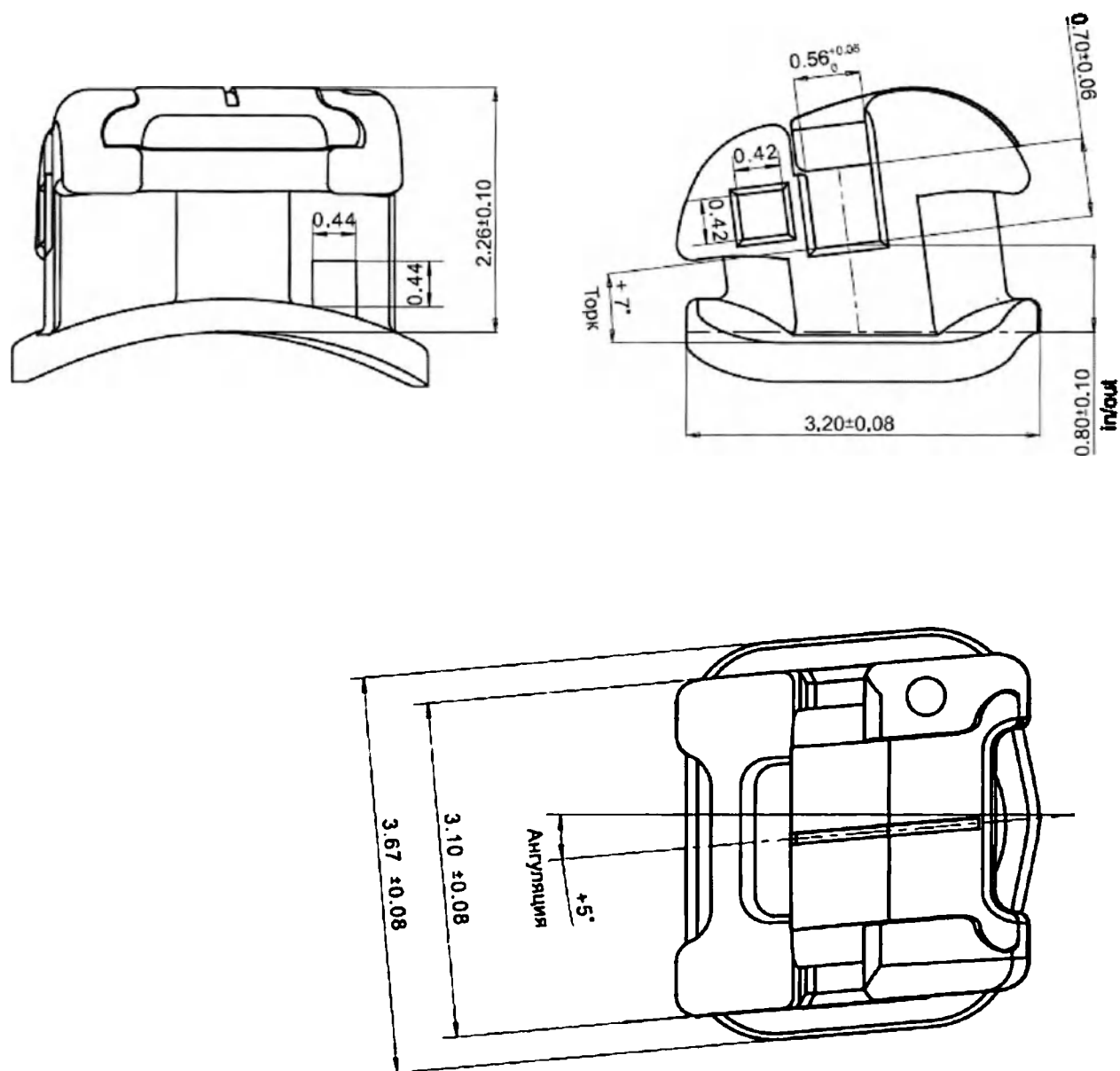


Рисунок 87. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 33 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-332(33)	+7	+5	0,090

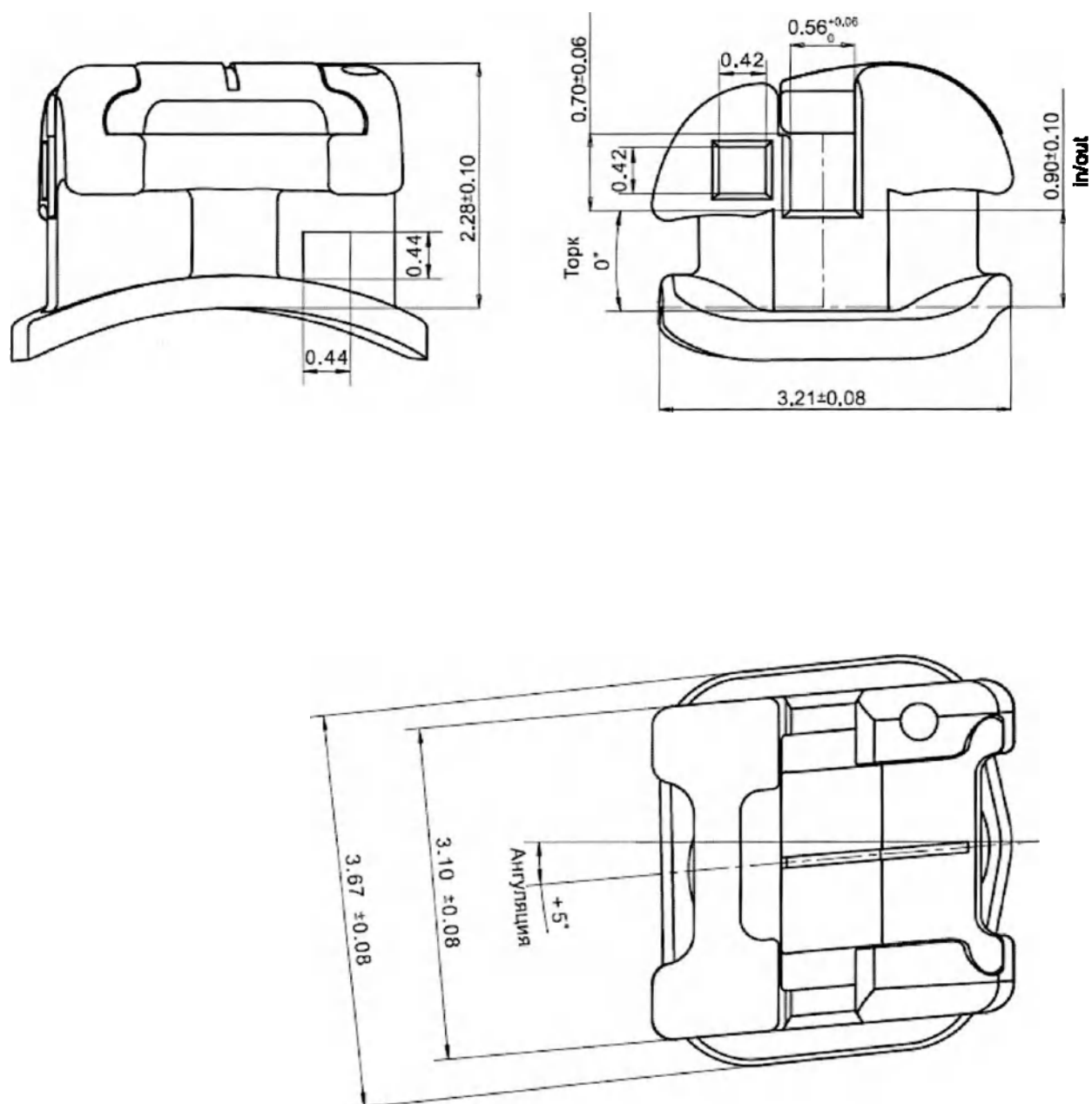


Рисунок 88. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 33 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-331(33)	0	+5	0,090

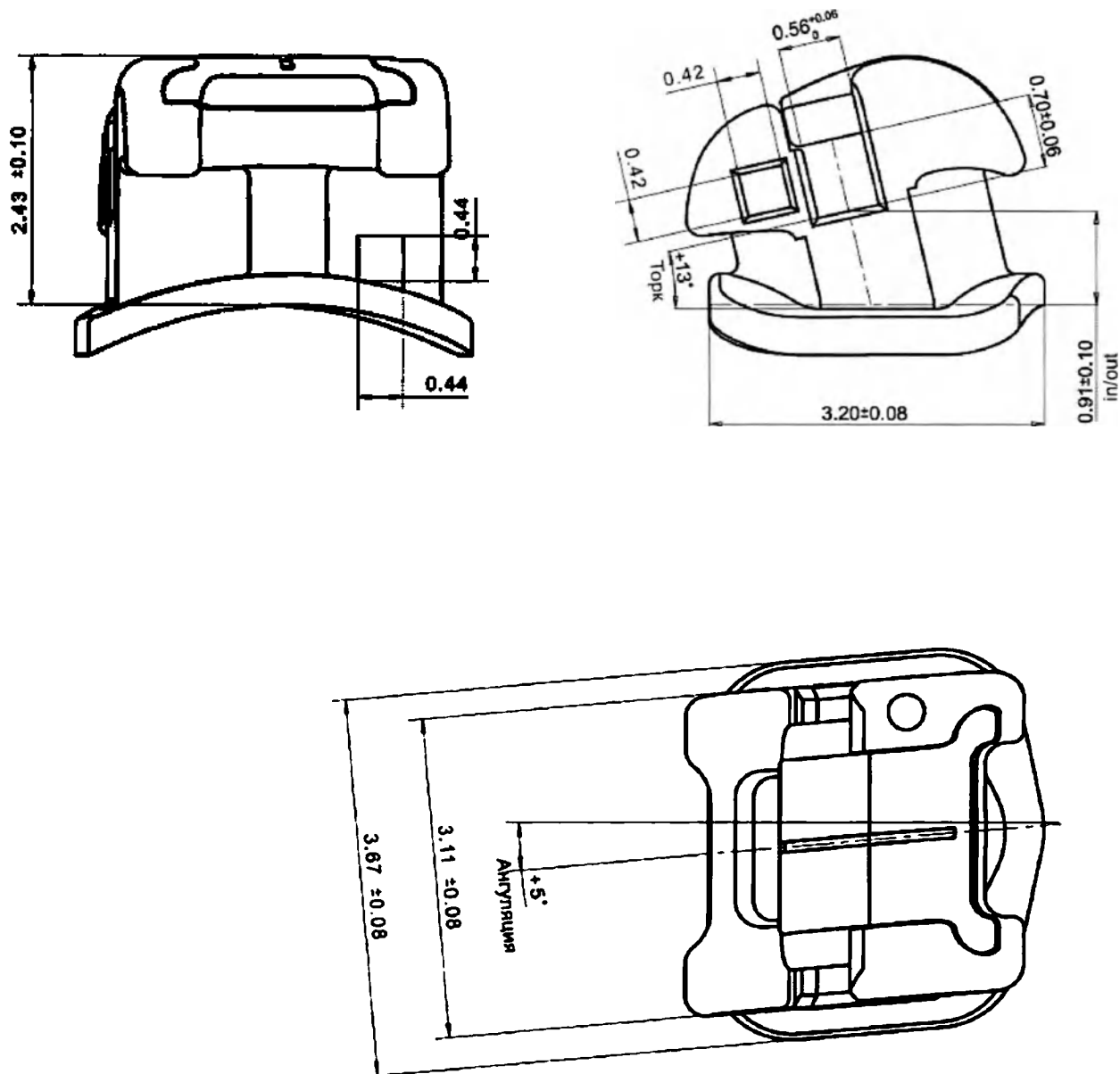


Рисунок 89. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Q» на 33 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-333(33)	+13	+5	0,090

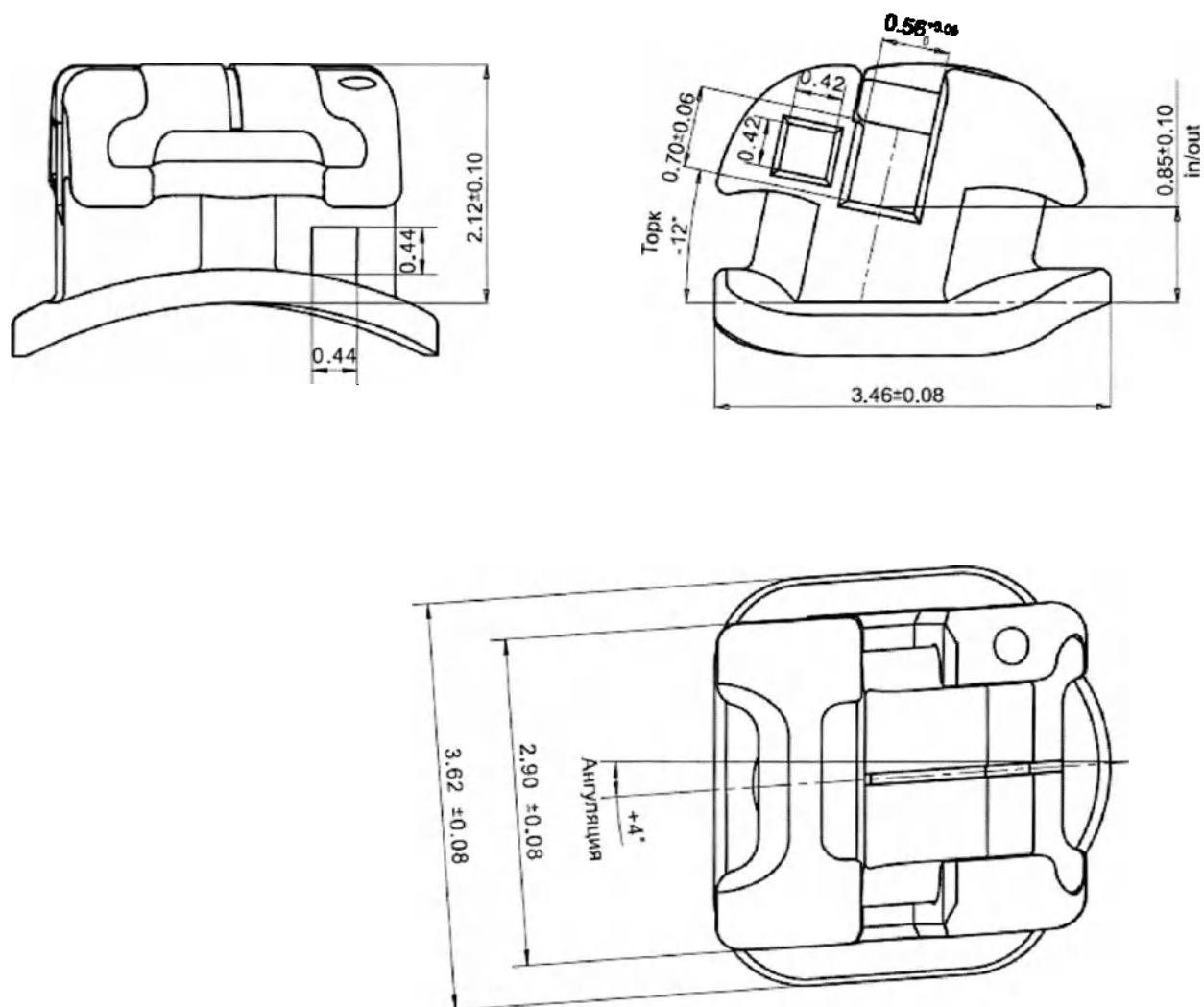


Рисунок 90. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 34 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-342(34)	-12	+4	0,090

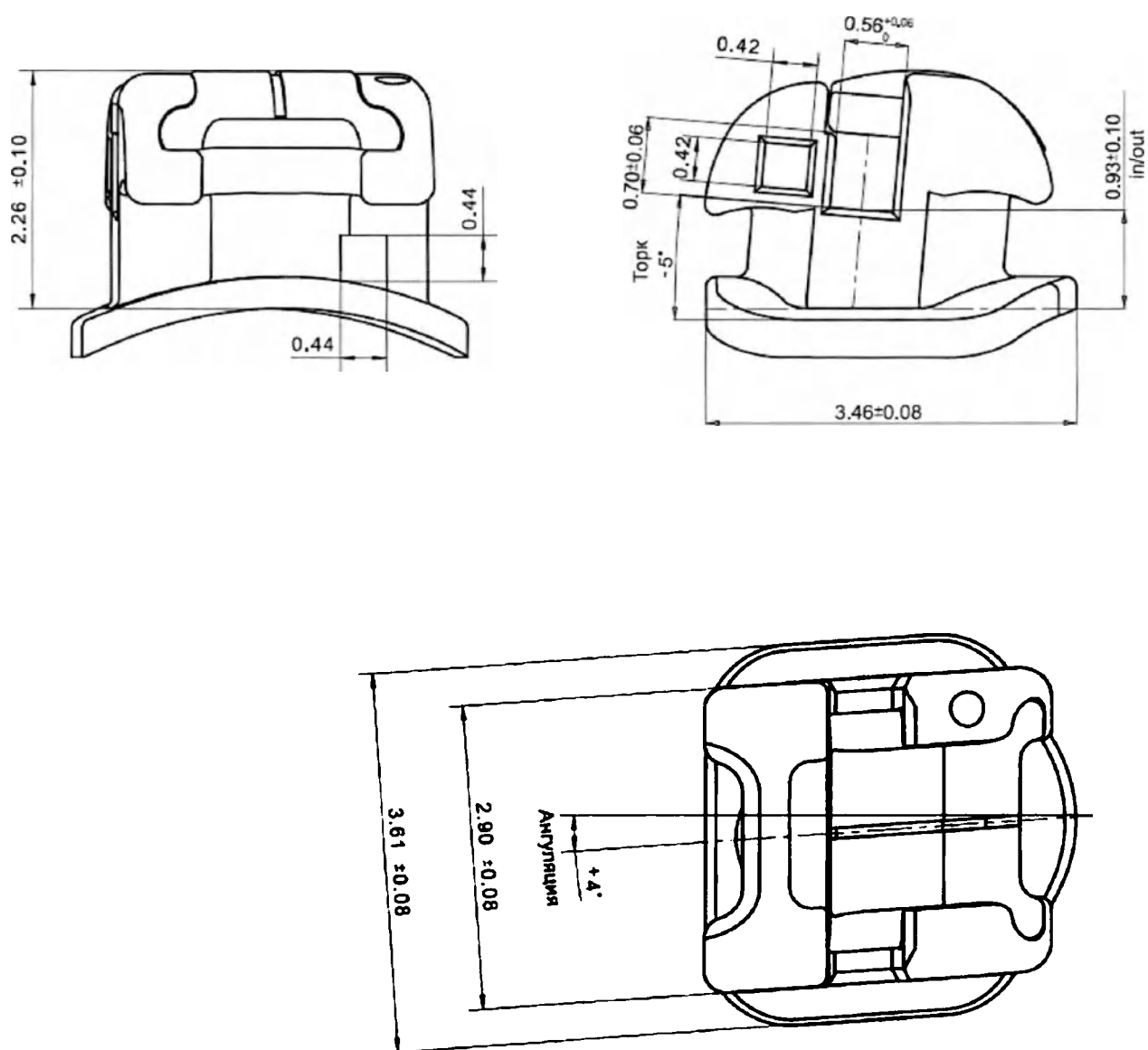


Рисунок 91. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 34 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-343(34)	-5	+4	0,090

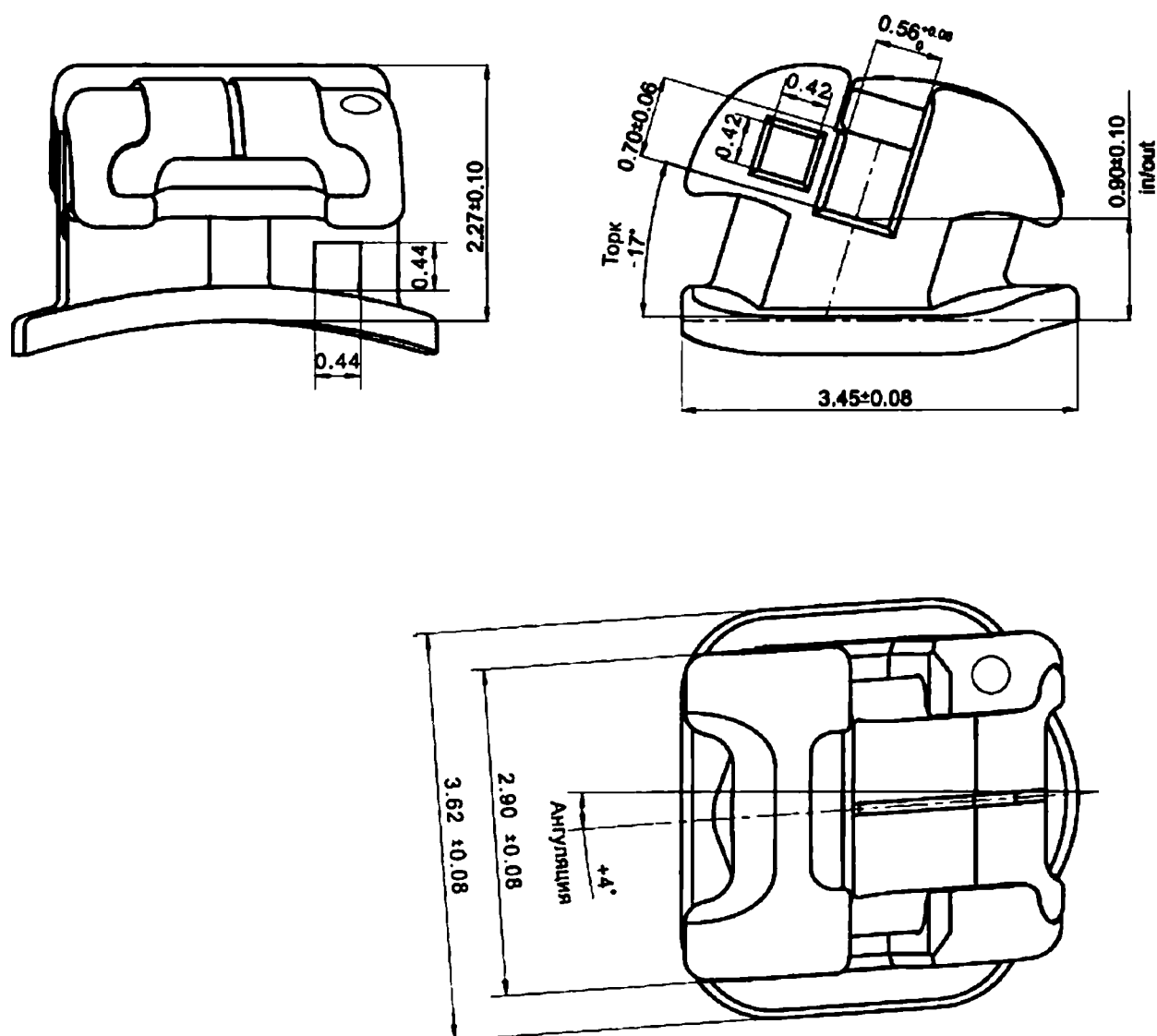


Рисунок 92. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 35 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-352(35)	-17	+4	0,090

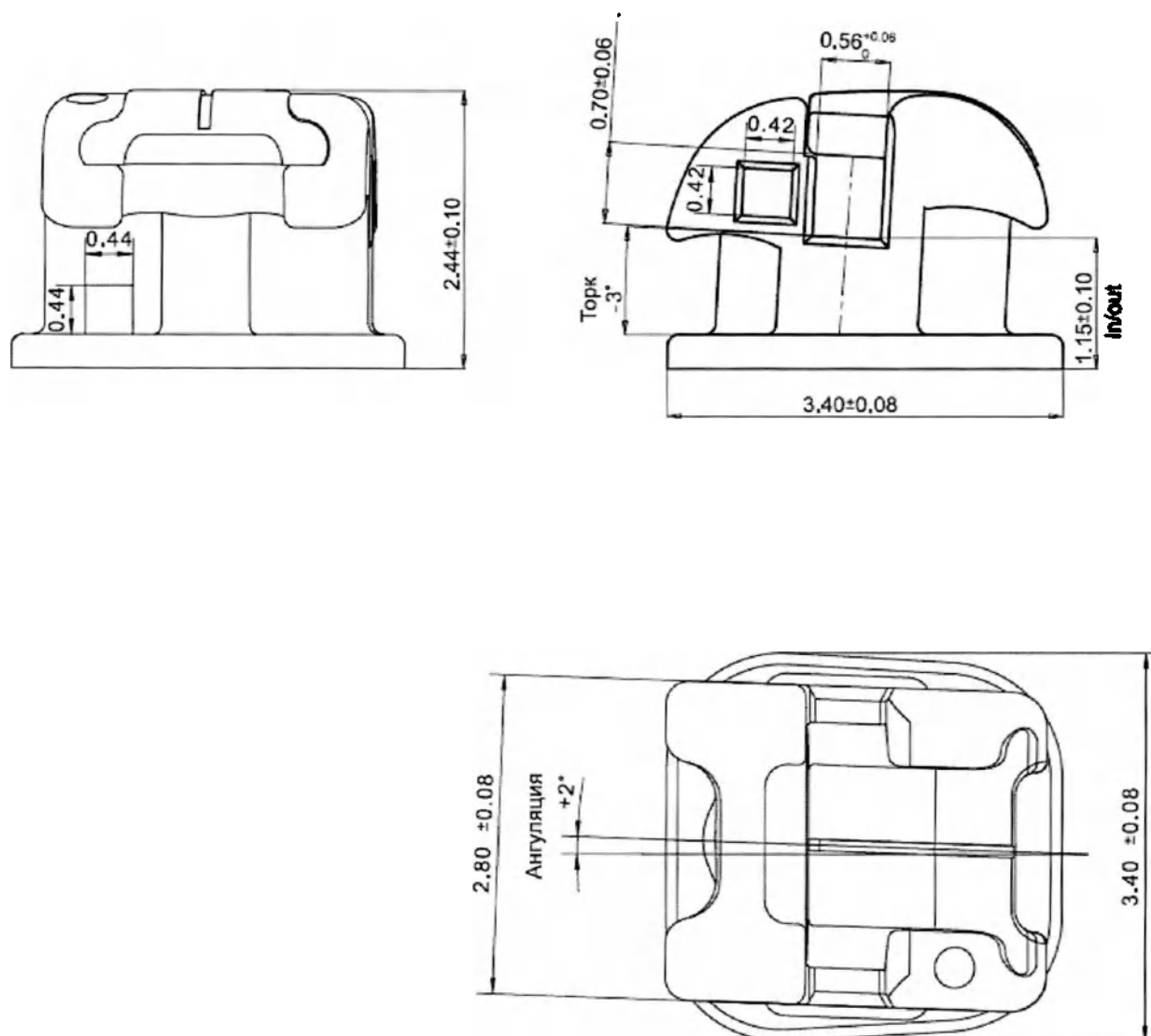


Рисунок 93. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 41 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-412(41)	-3	+2	0,090

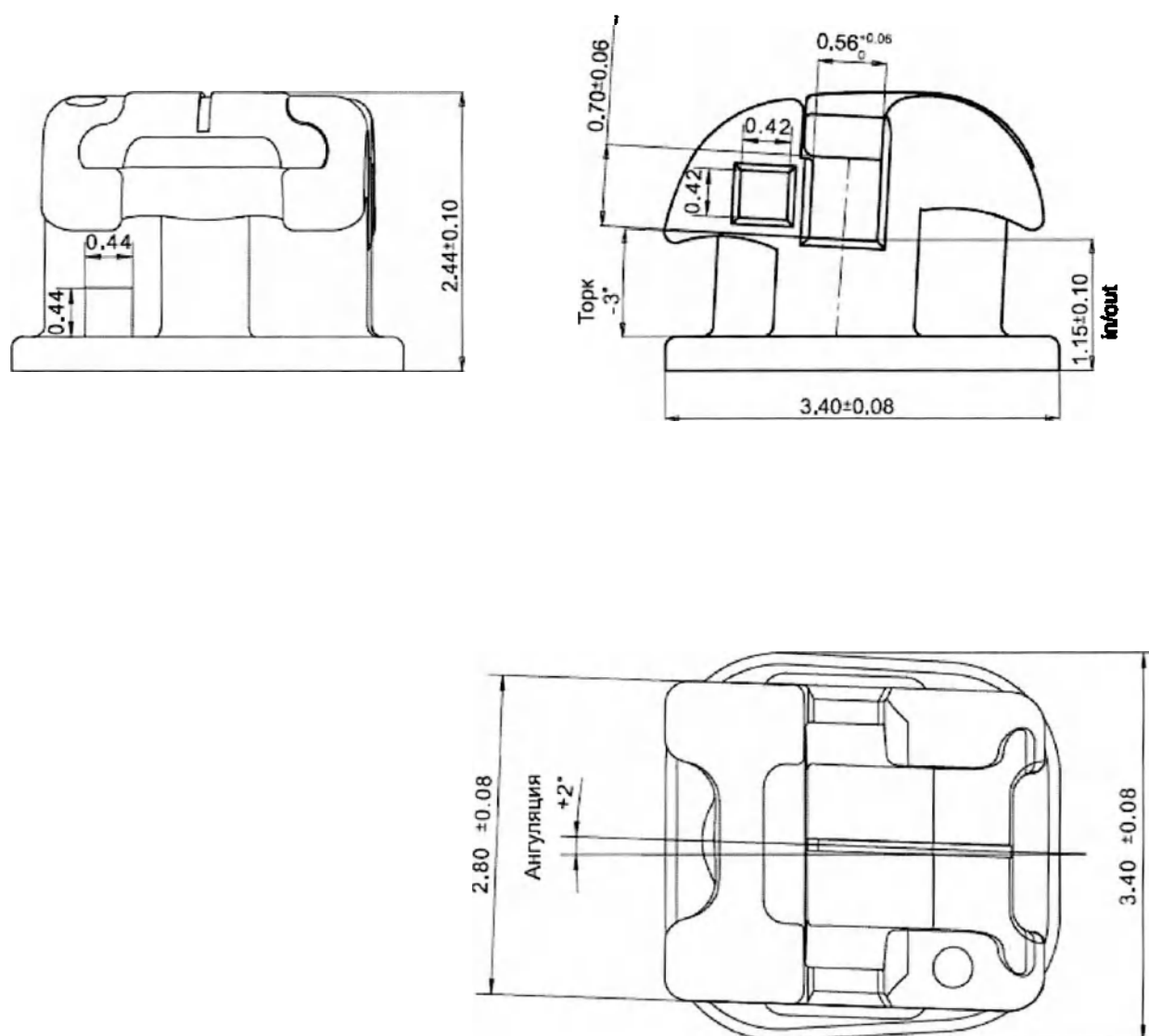


Рисунок 95. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 42 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-422(42)	-3	+2	0,090

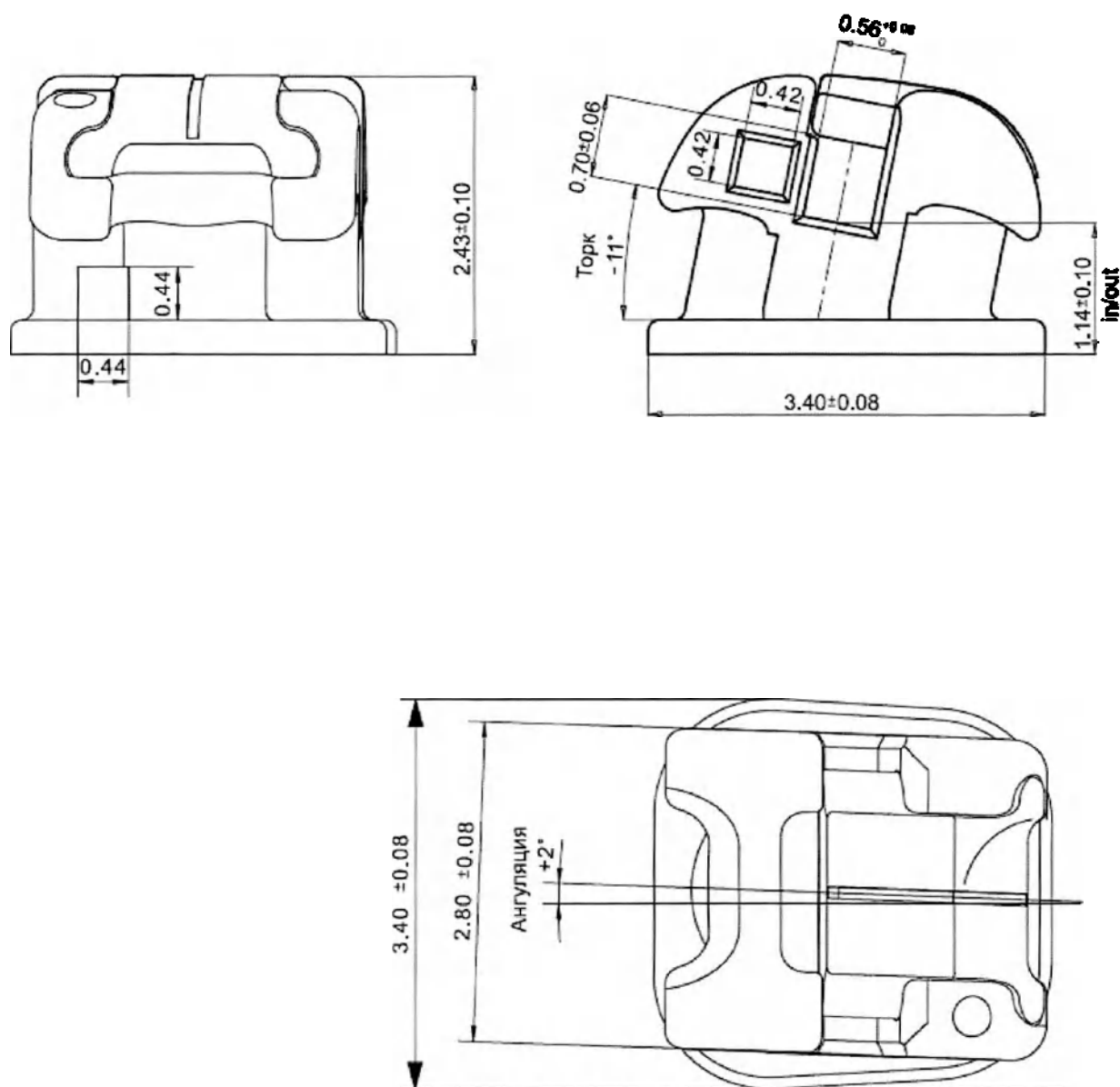


Рисунок 96. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 42 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-421(42)	-11	+2	0,090

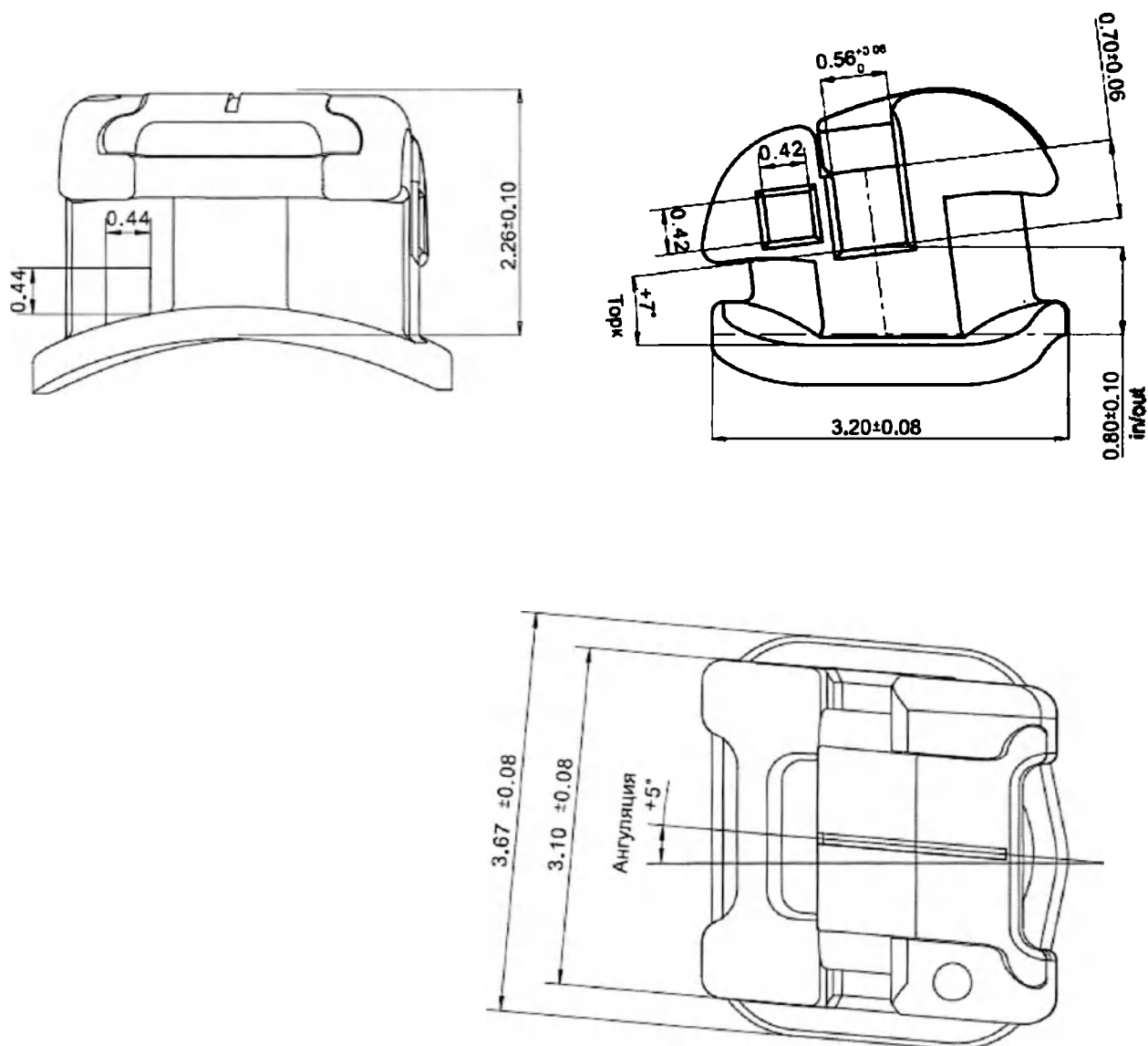


Рисунок 97. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 43 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-432(43)	+7	+5	0,090

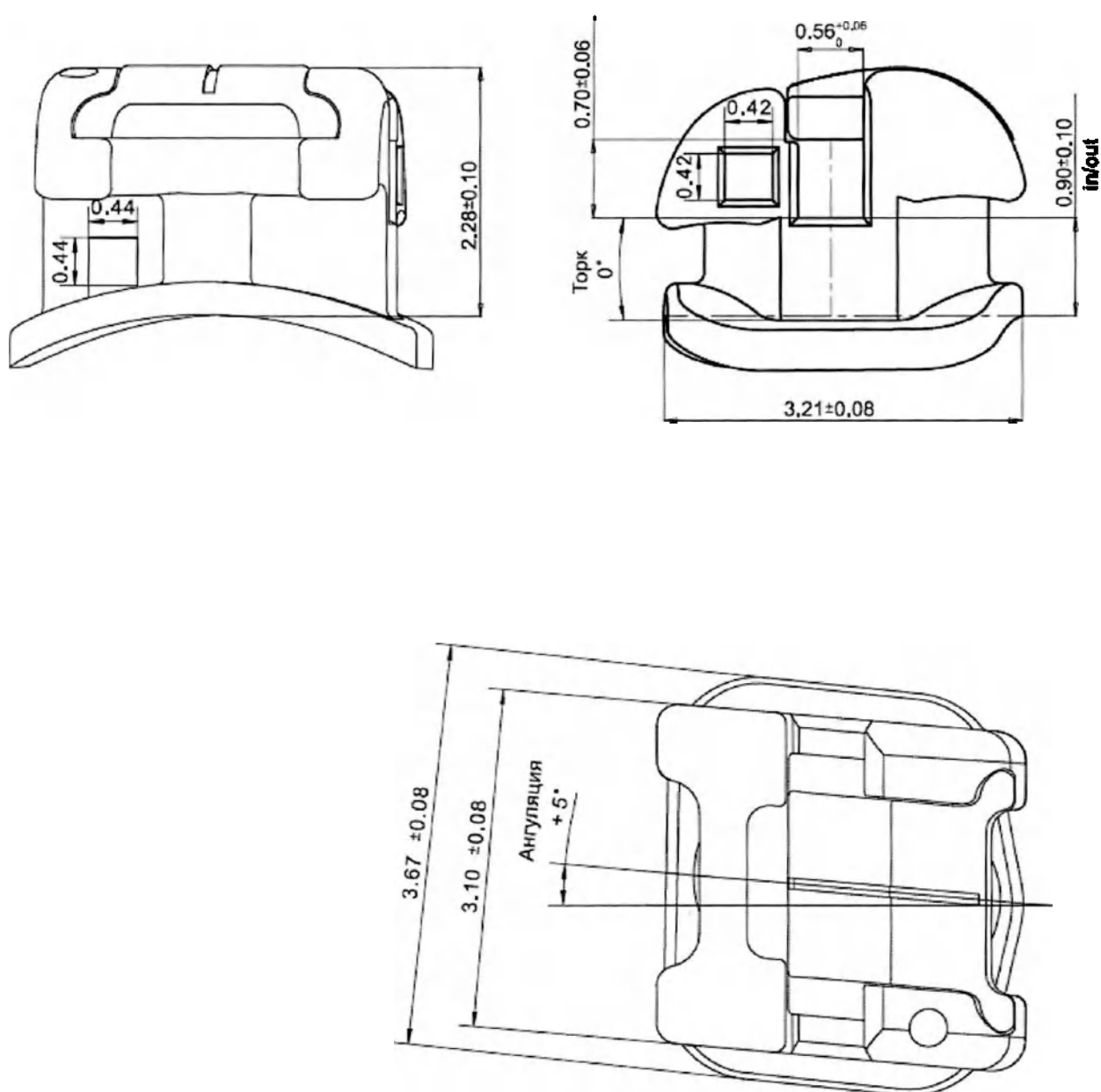


Рисунок 98. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 43 зуб, без крючка, низкий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-431(43)	0	+5	0,090

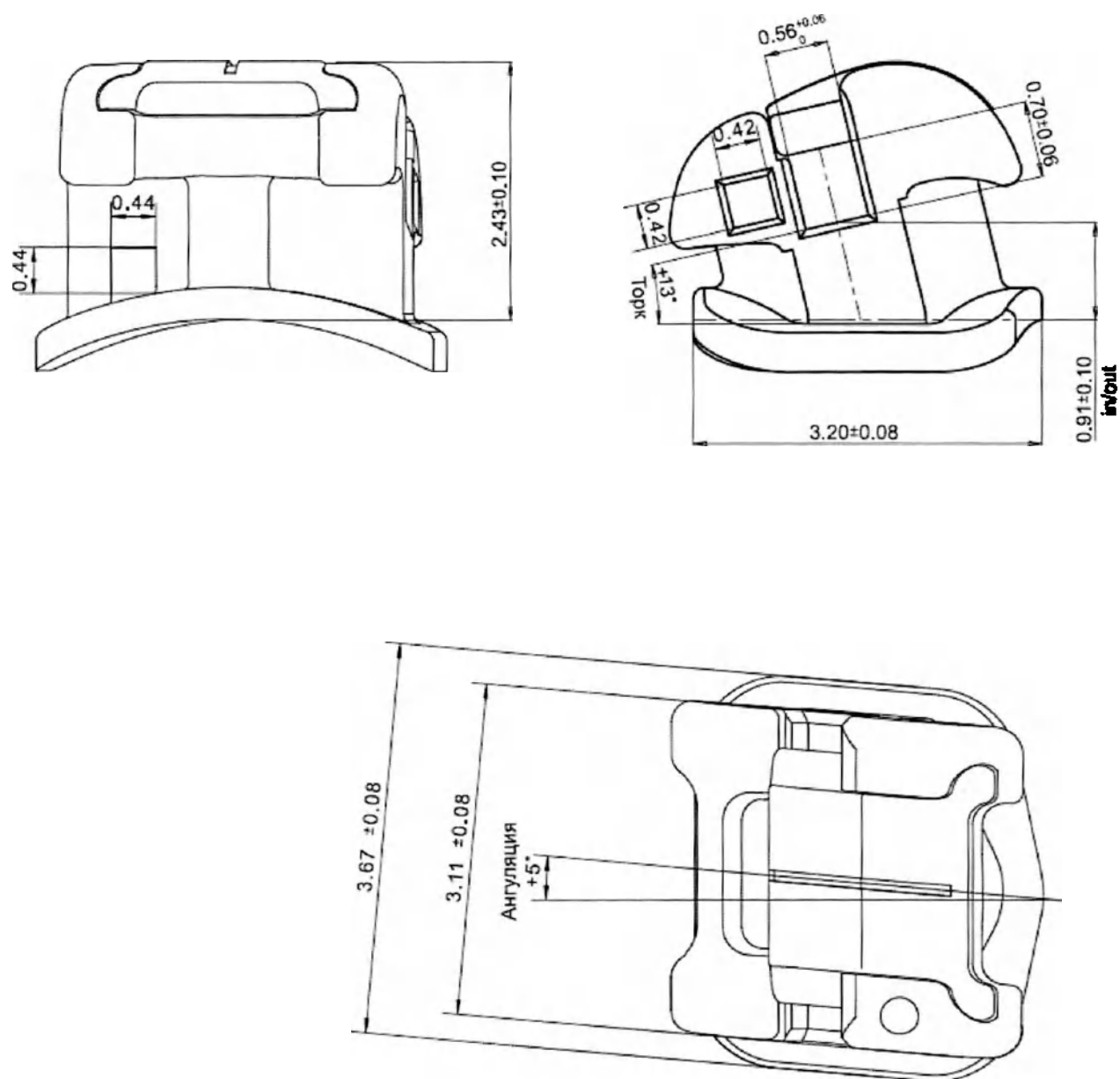


Рисунок 99. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 43 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-433(43)	+13	+5	0,090

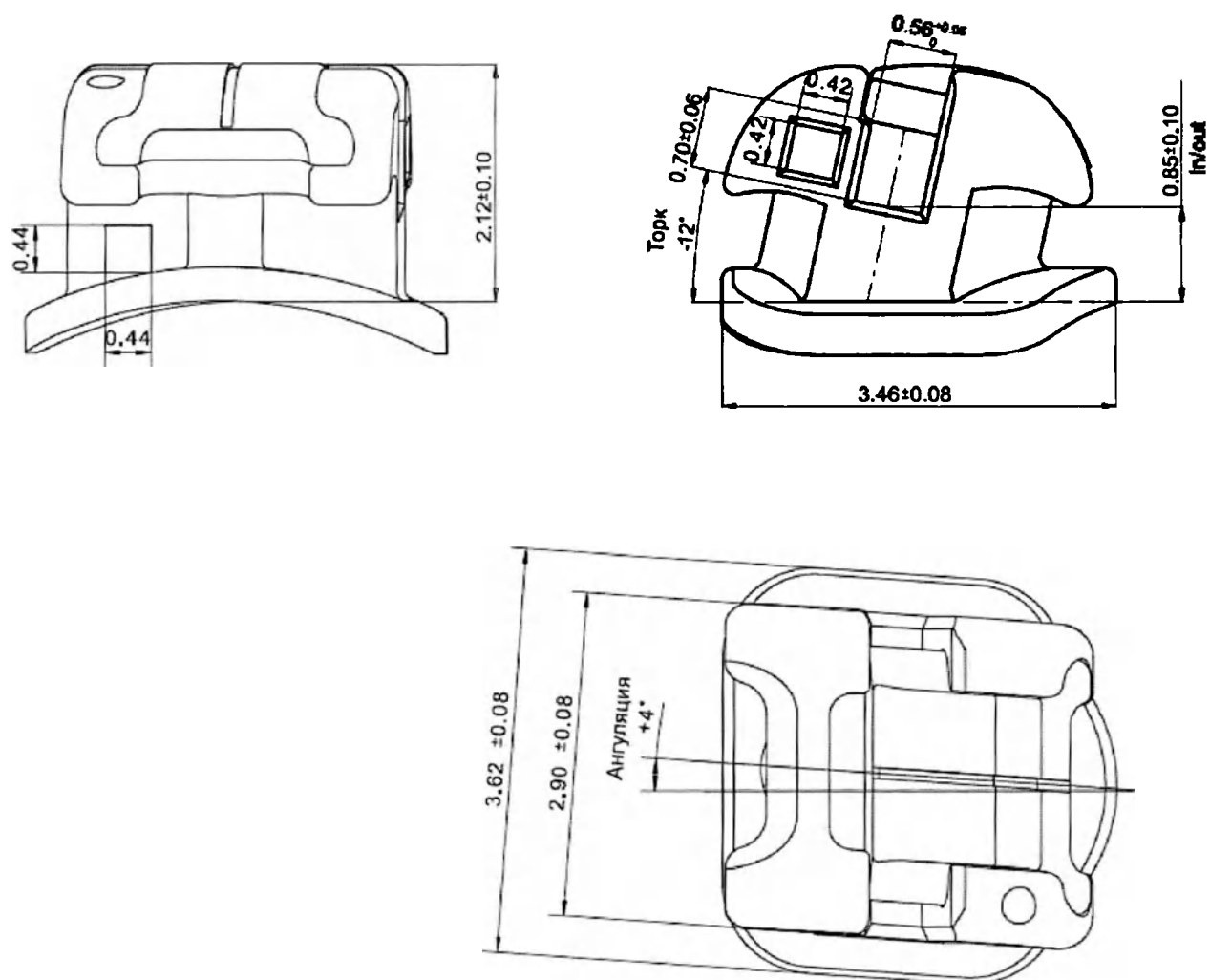


Рисунок 100. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 44 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-442(44)	-12	+4	0,090

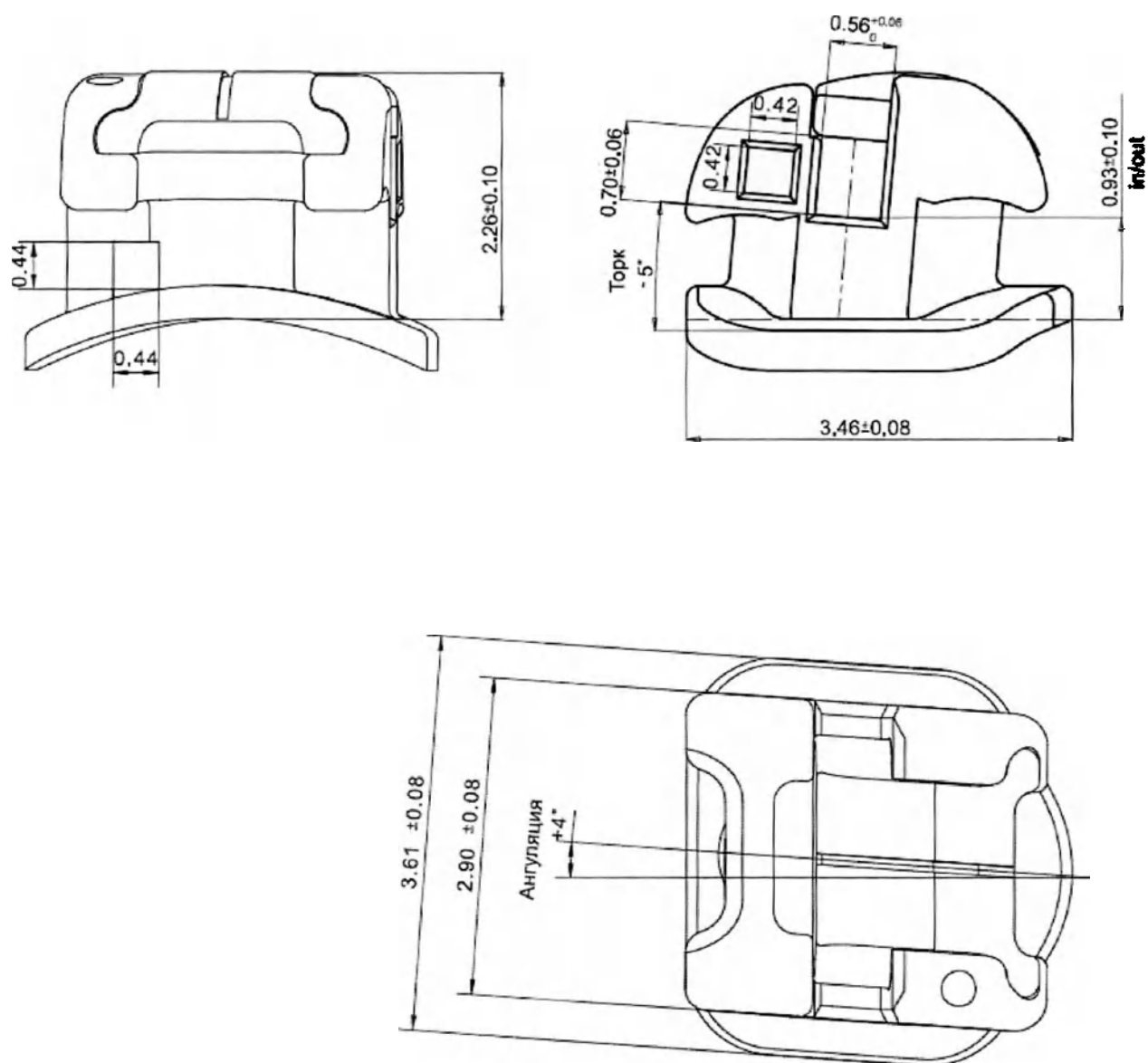


Рисунок 101. Брекеты металлический самолигирующий «NexStep Q» на 44 зуб, без крючка, высокий торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-443(44)	-5	+4	0,090

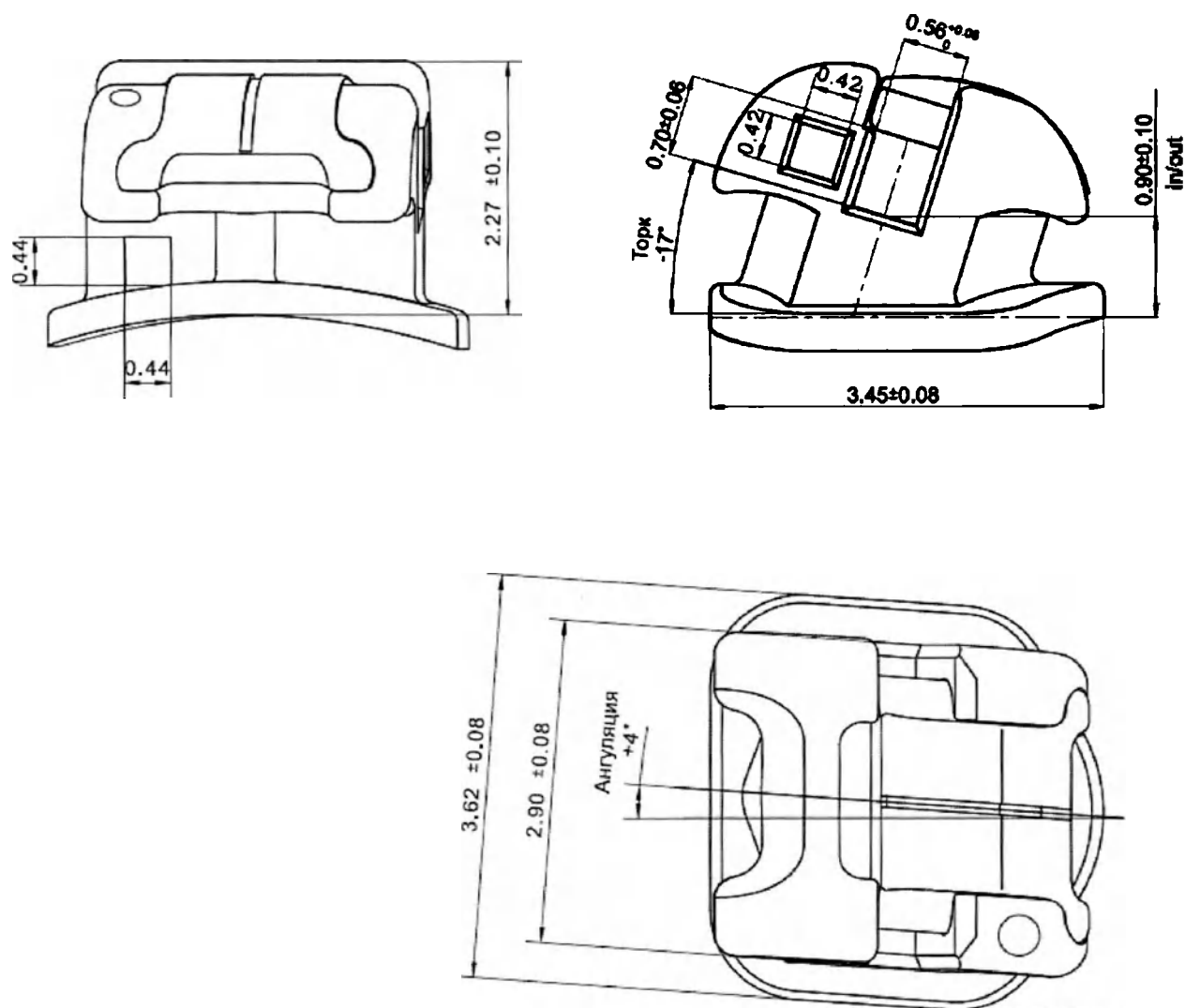


Рисунок 102. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Q» на 45 зуб, без крючка, стандартный торк

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
22-452(45)	-17	+4	0,090

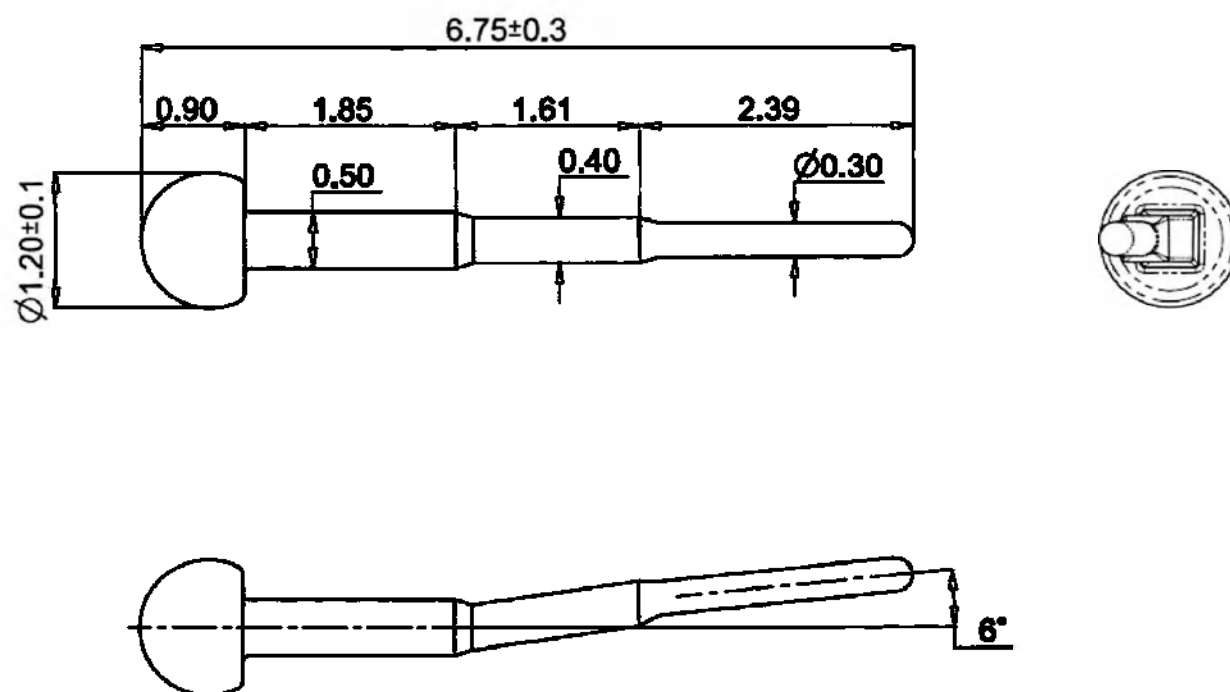


Рисунок 103. Вставной крючок для модели брекетов «NexStep Q» на 3, 4, 5 зуб.

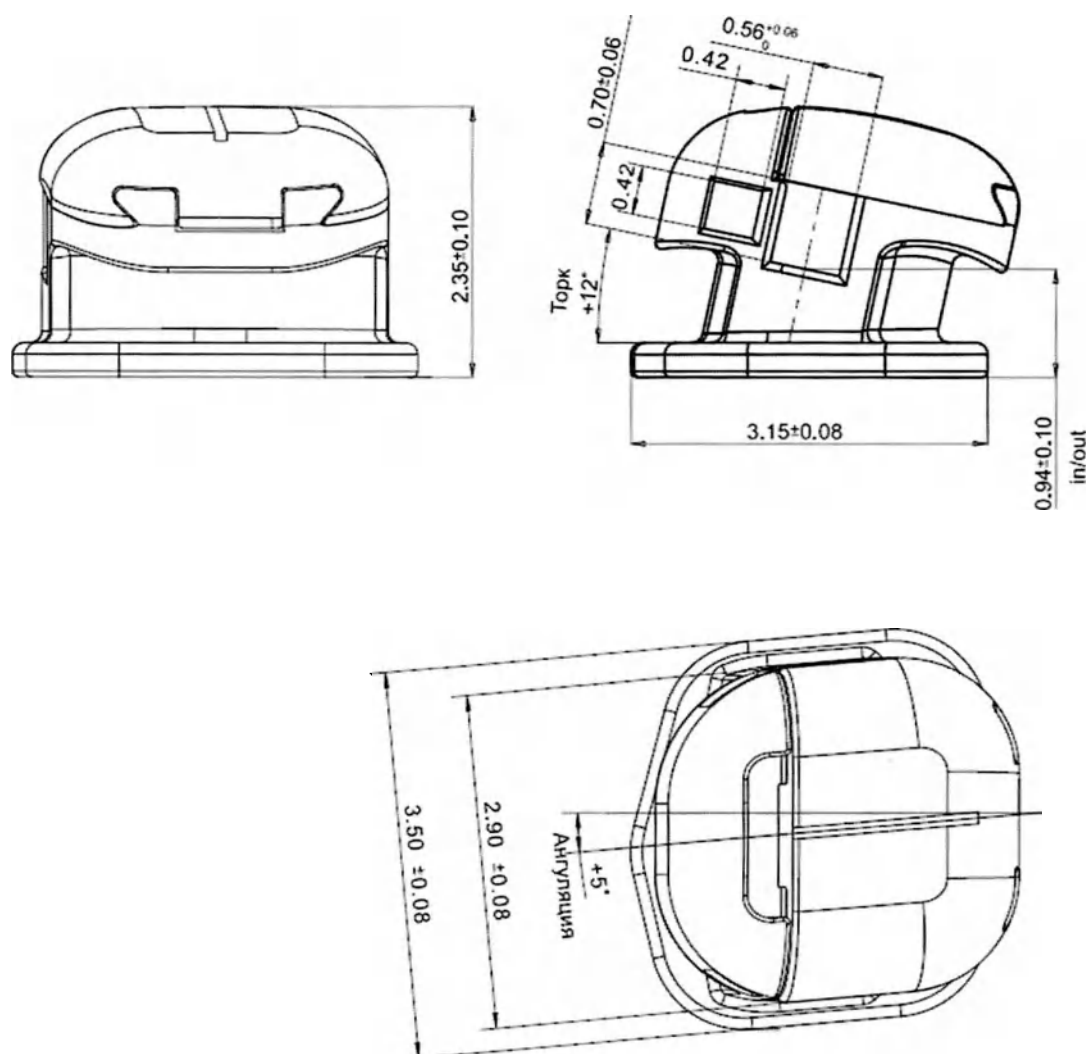


Рисунок 104. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 11 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-116(11)	+12	+5	0,090


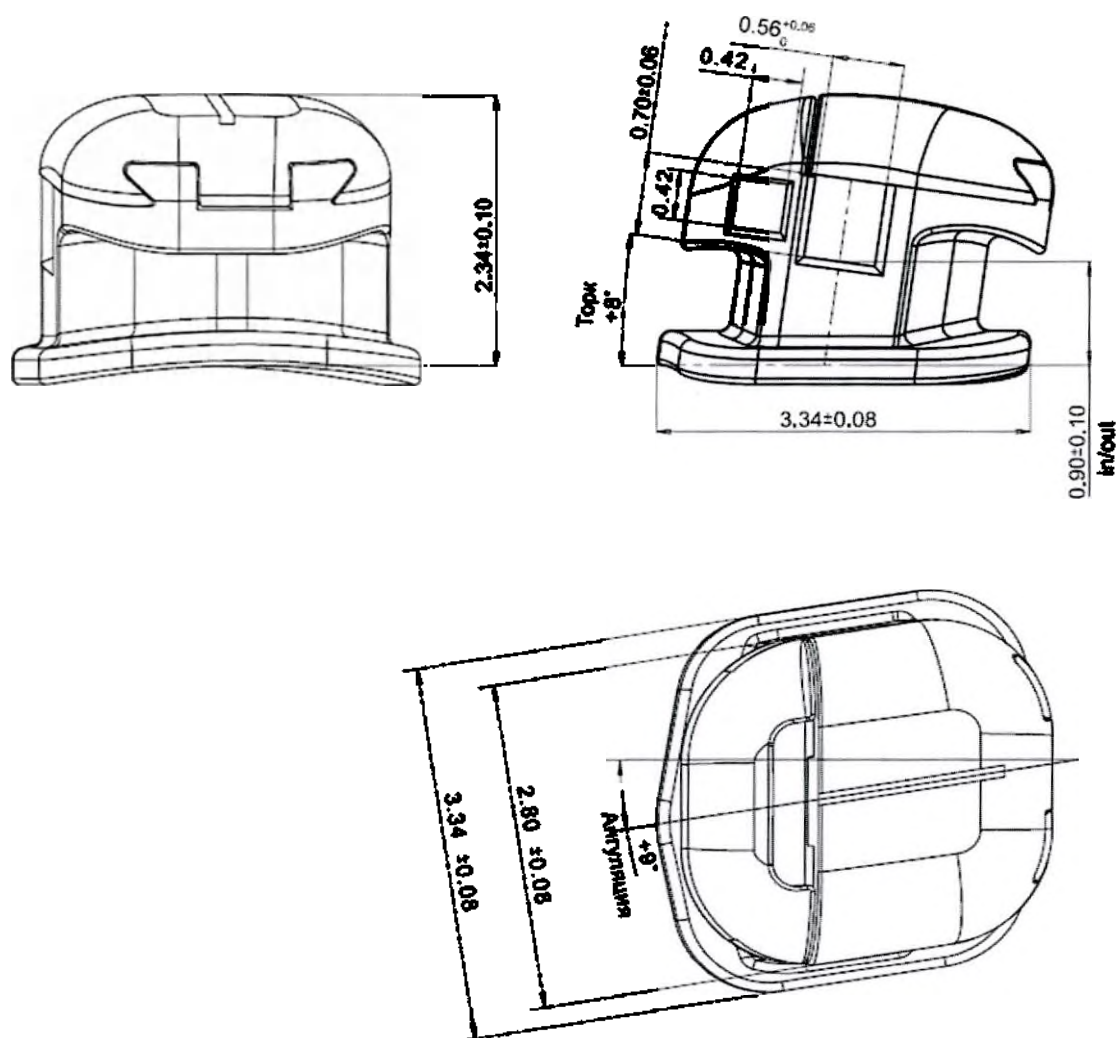



Рисунок 105. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 12 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-126(12)	+8	+9	0,090

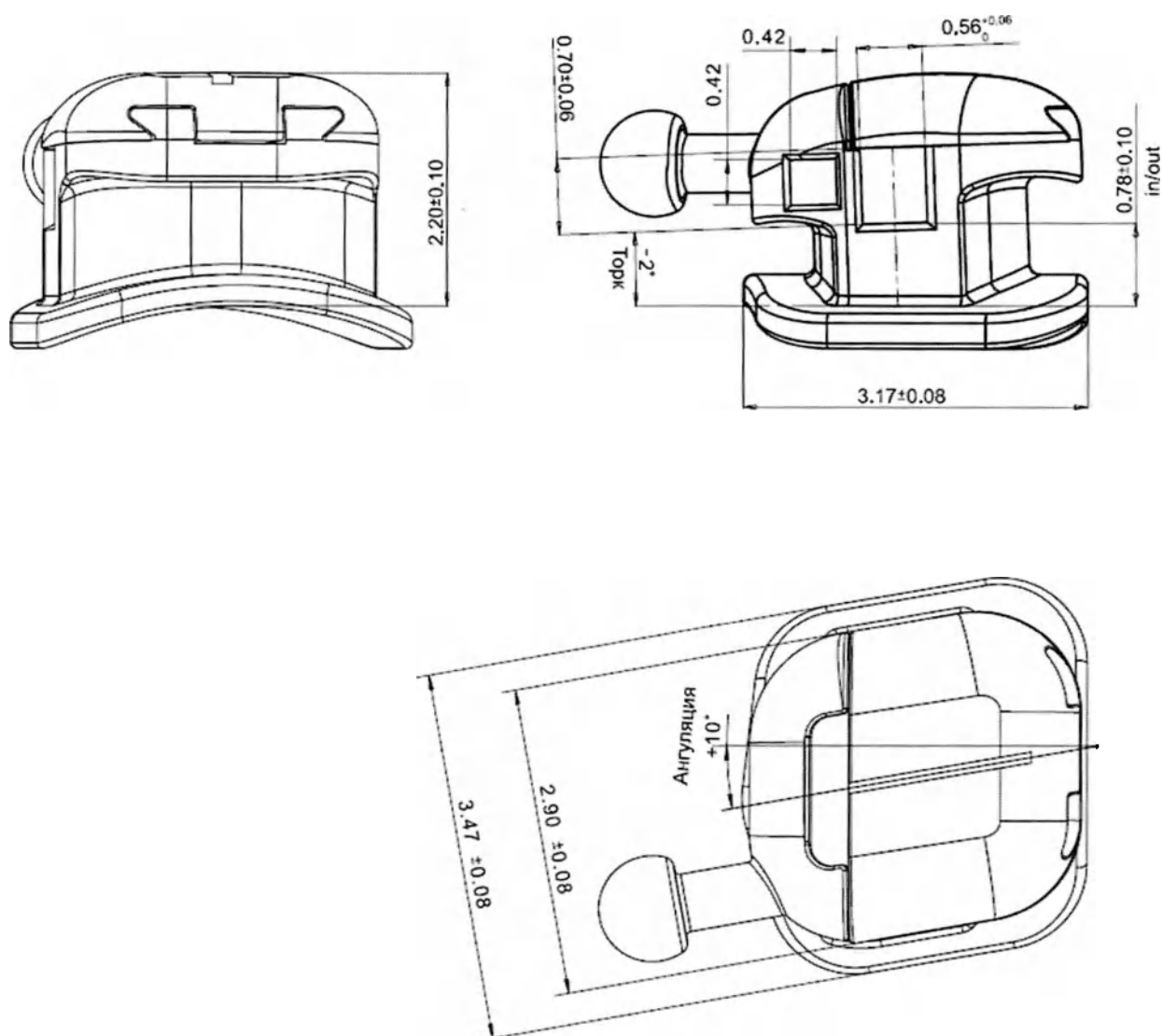


**Рисунок 105. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra»
на 13 зуб, с крючком, пропись Roth**

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-136(13)	-2	+10	0,090

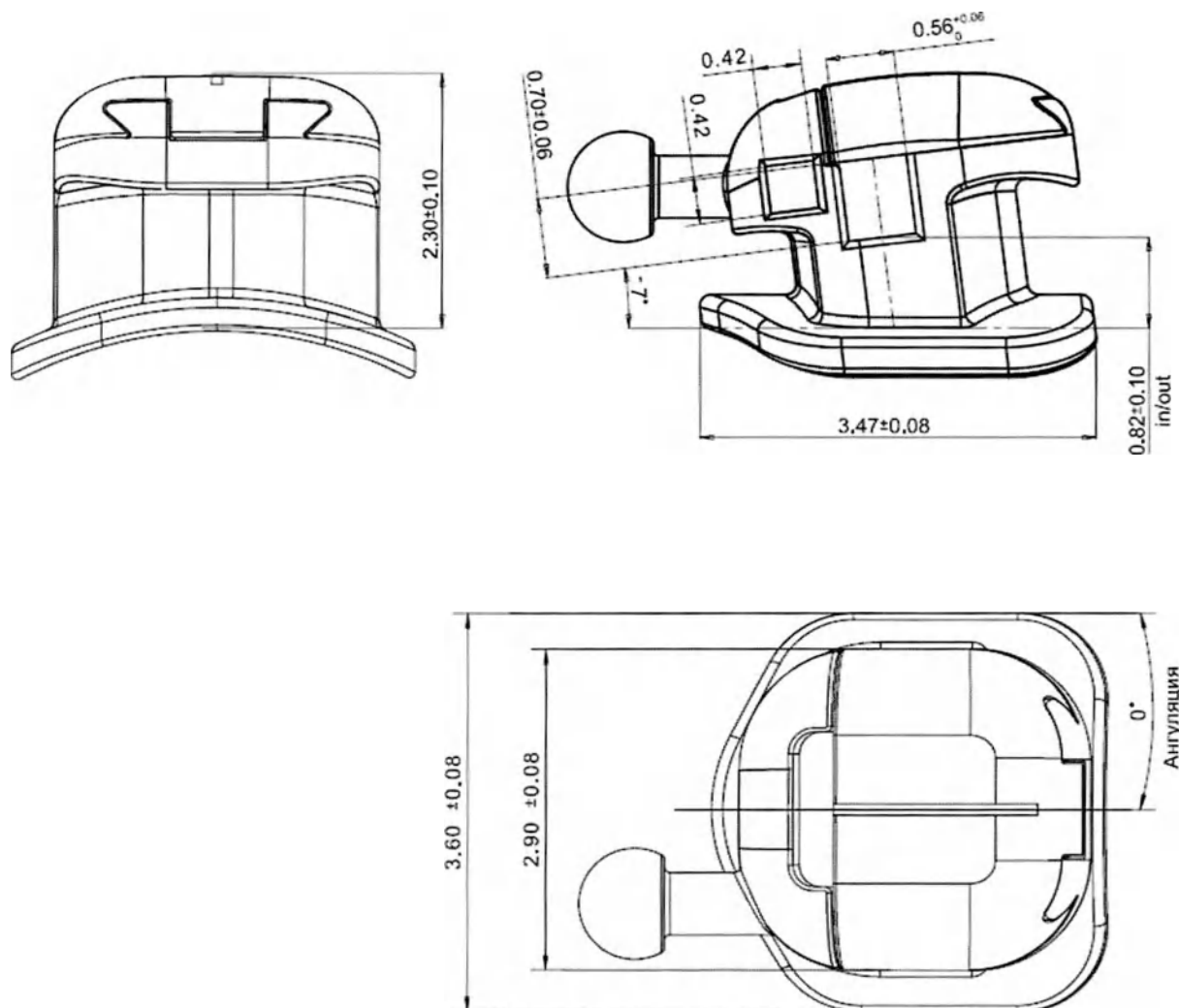

**Рисунок 106. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra»
на 14 зуб, с крючком, пропись Roth**

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-146(14)	-7	0	0,095

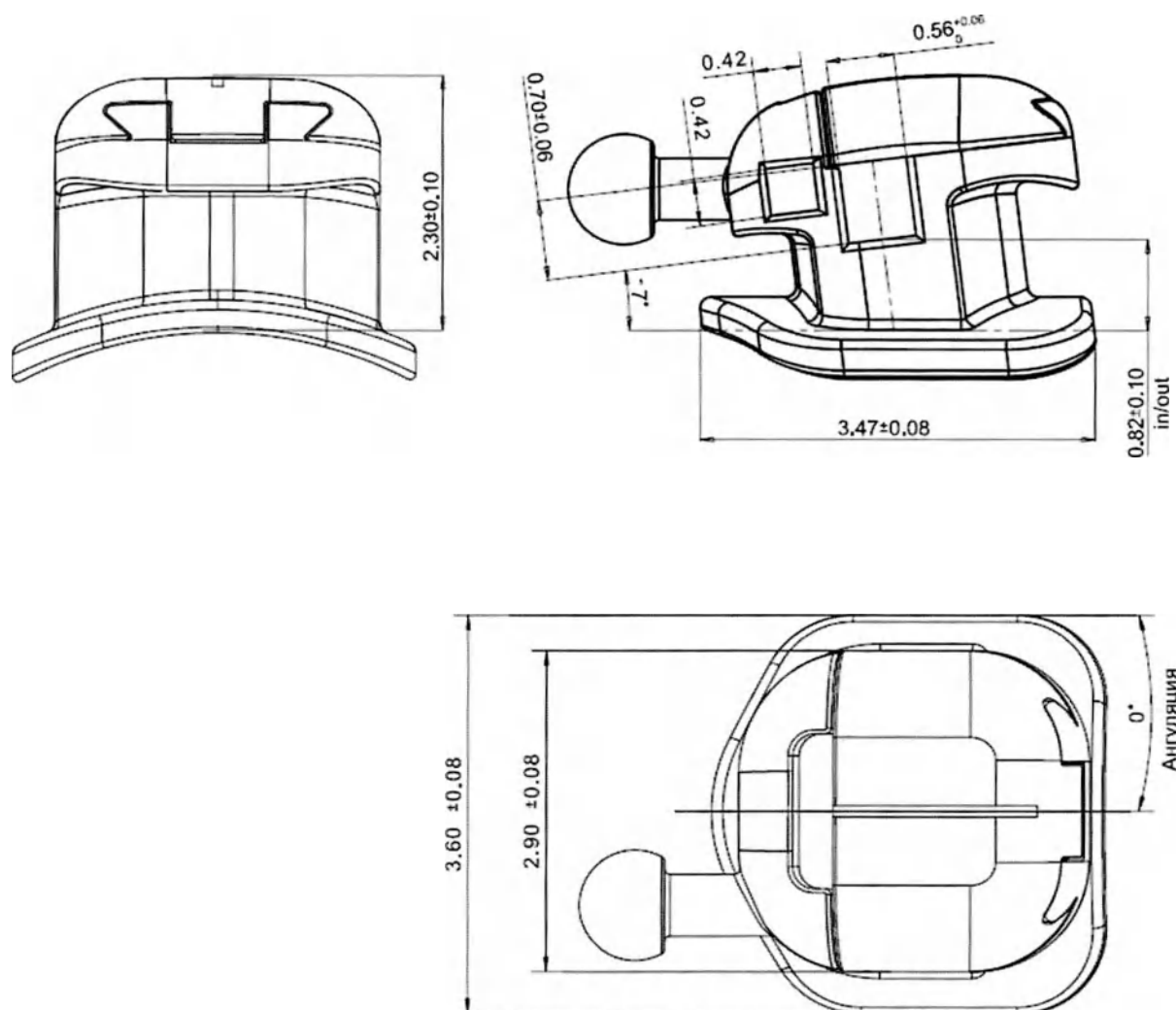

**Рисунок 107. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra»
на 15 зуб, с крючком, пропись Roth**

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-156(15)	-7	0	0,090

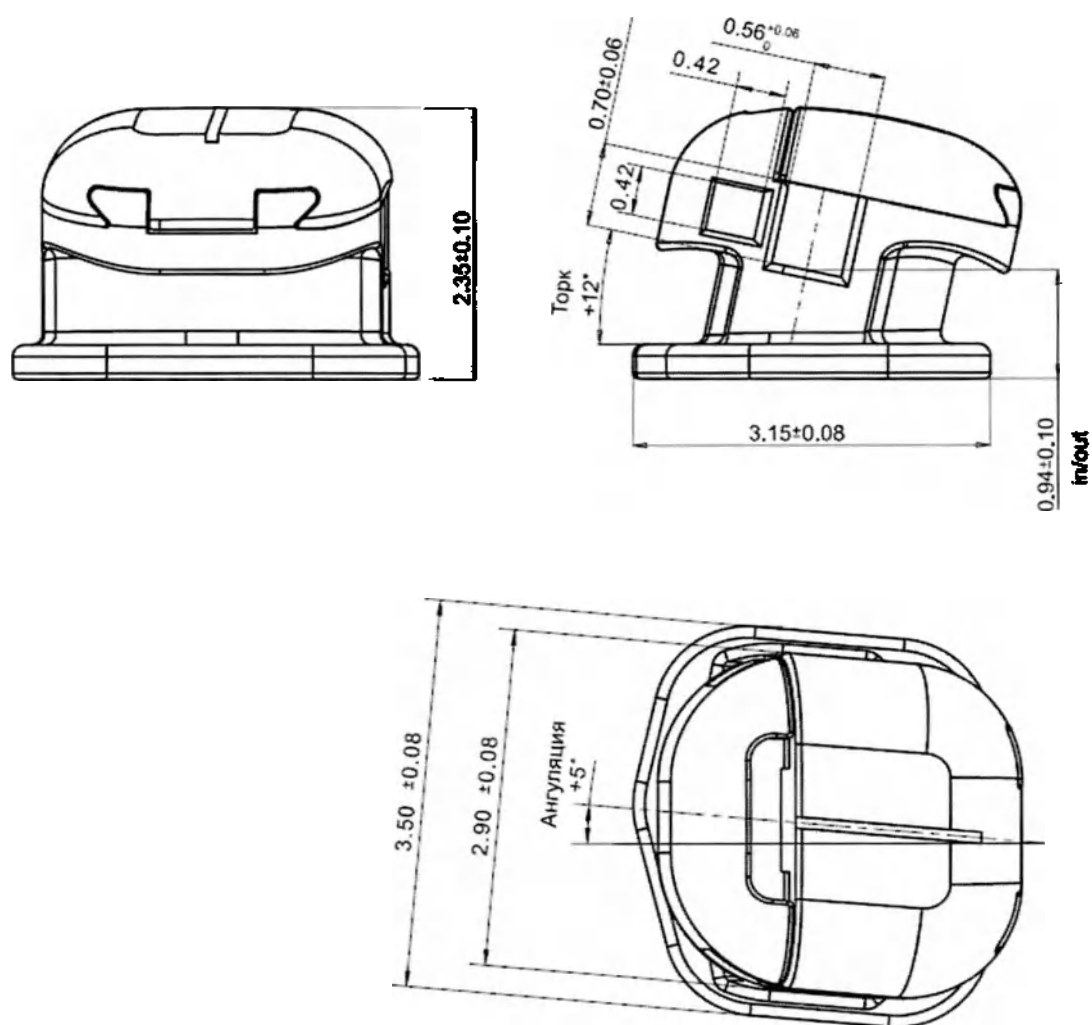


Рисунок 108. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 21 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-216(21)	+12	+5	0,090

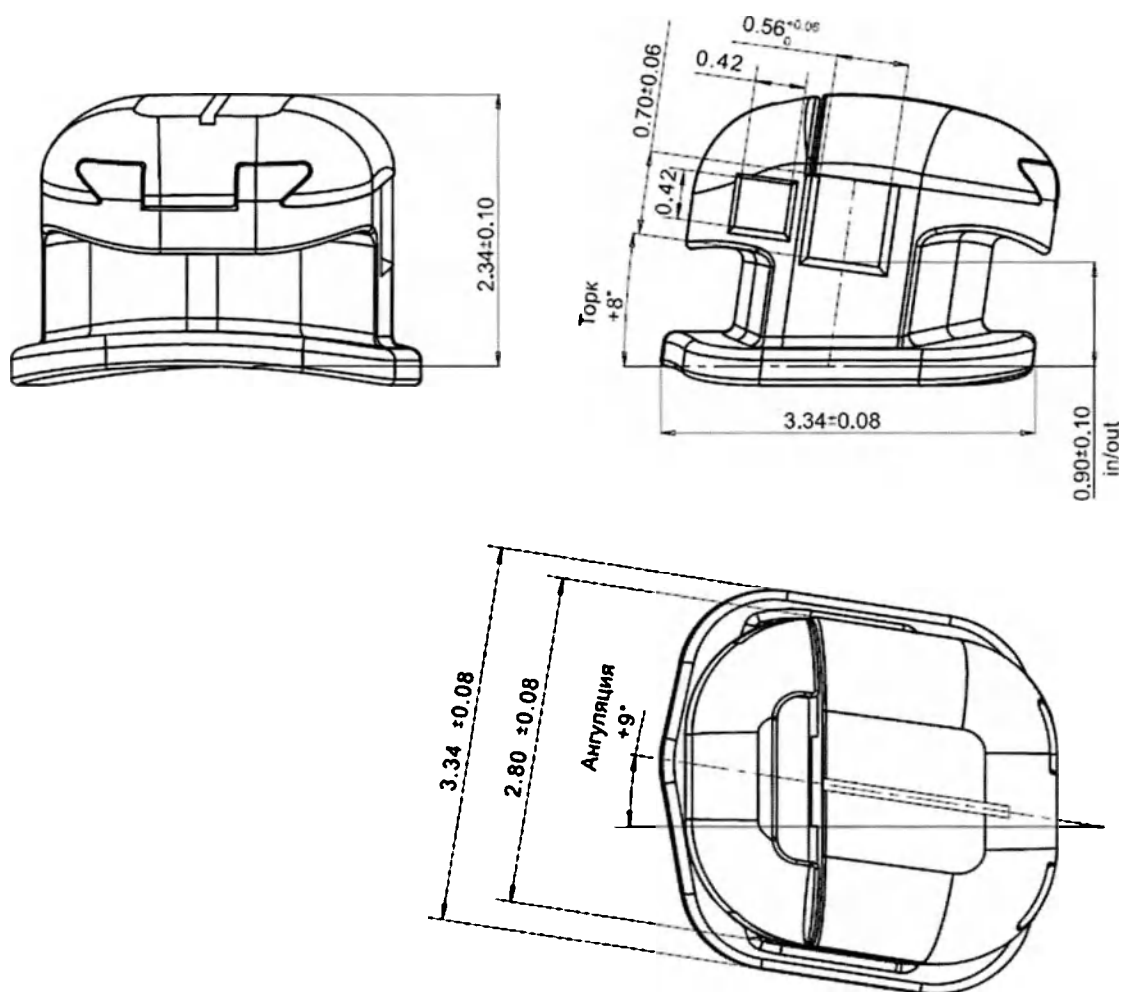


Рисунок 109. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 22 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-226(22)	+8	+9	0,090

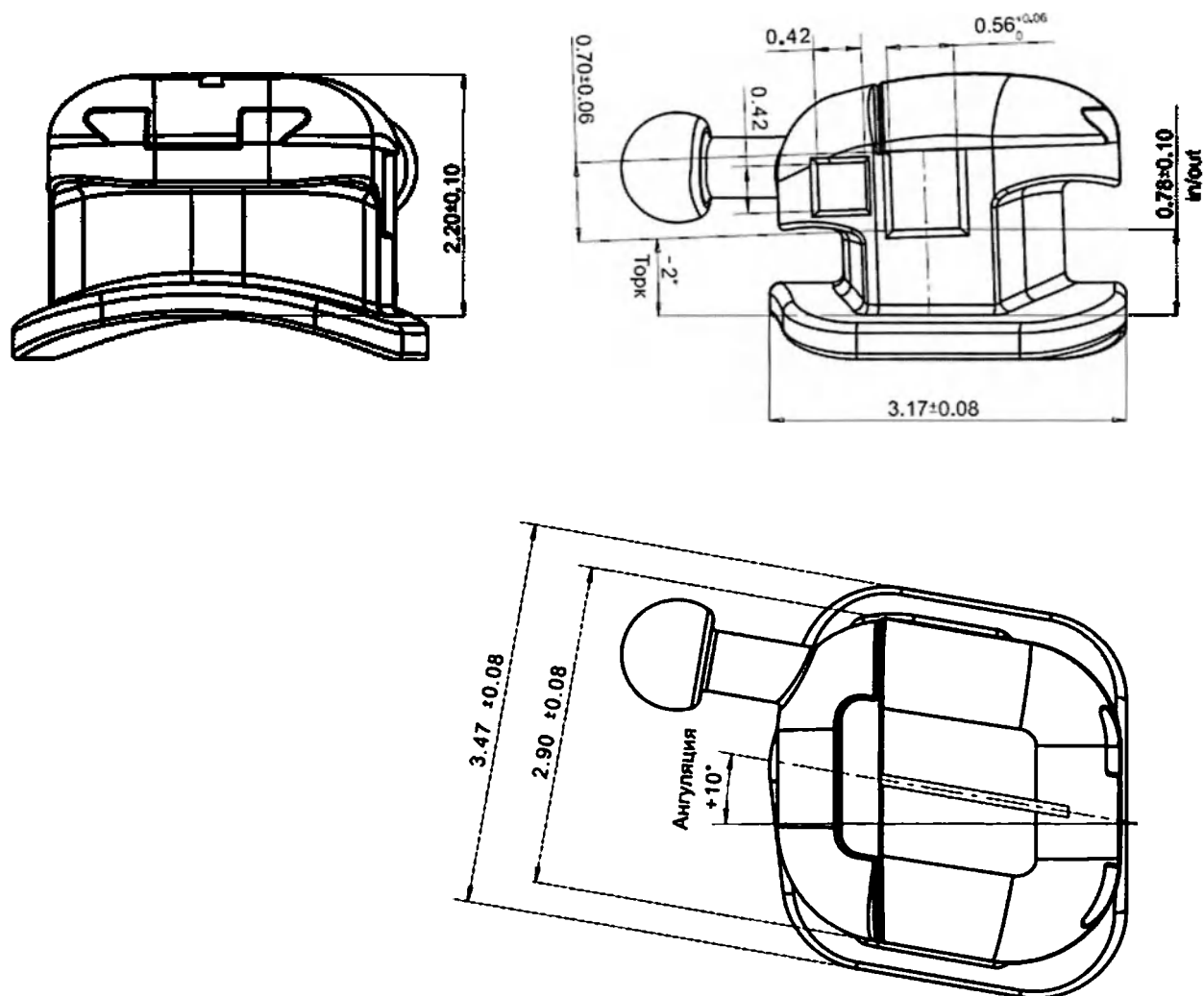


Рисунок 110. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 23 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-236(23)	-2	+10	0,095

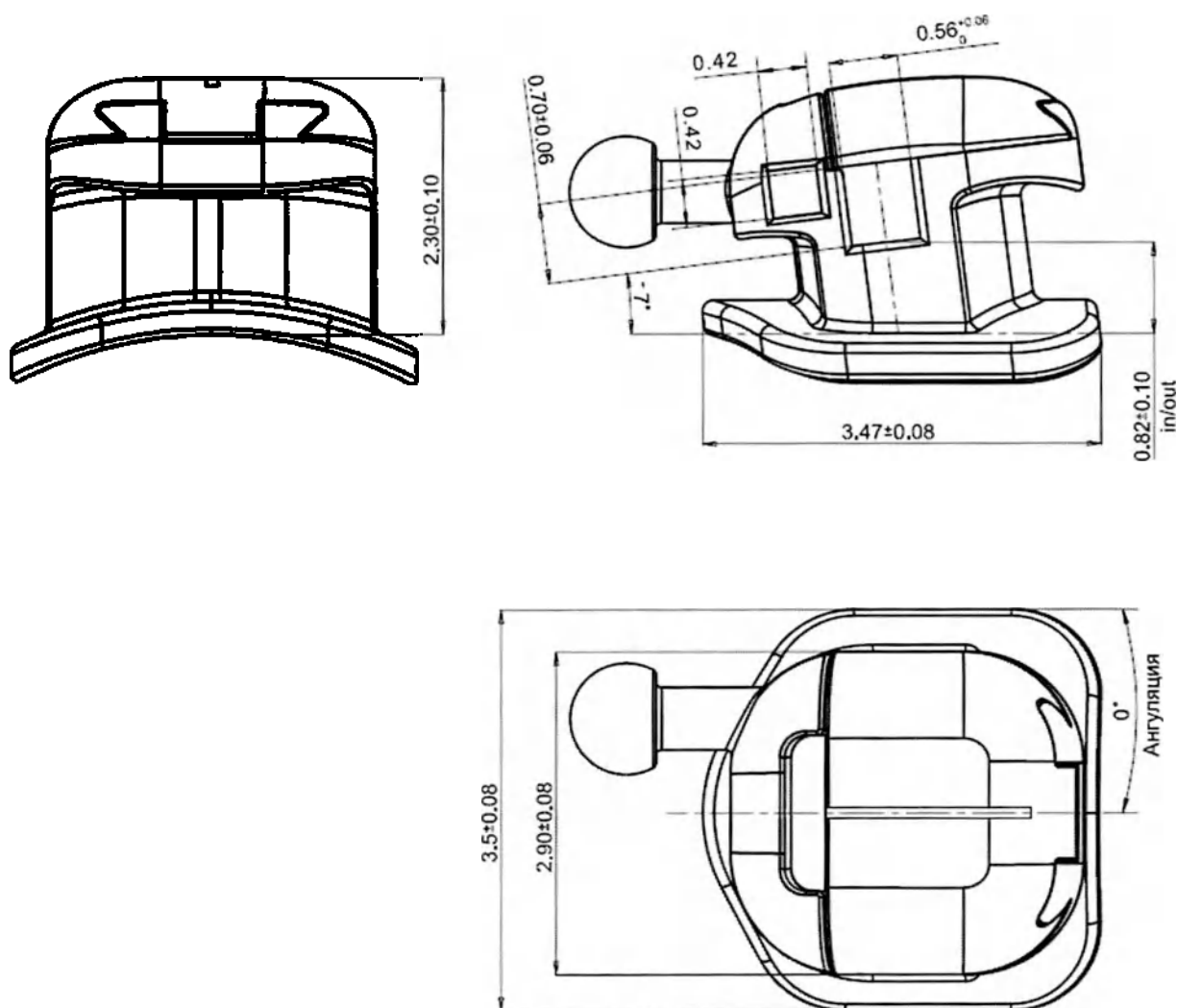


Рисунок 111. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 24 зуба, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-246(24)	-7	0	0,095

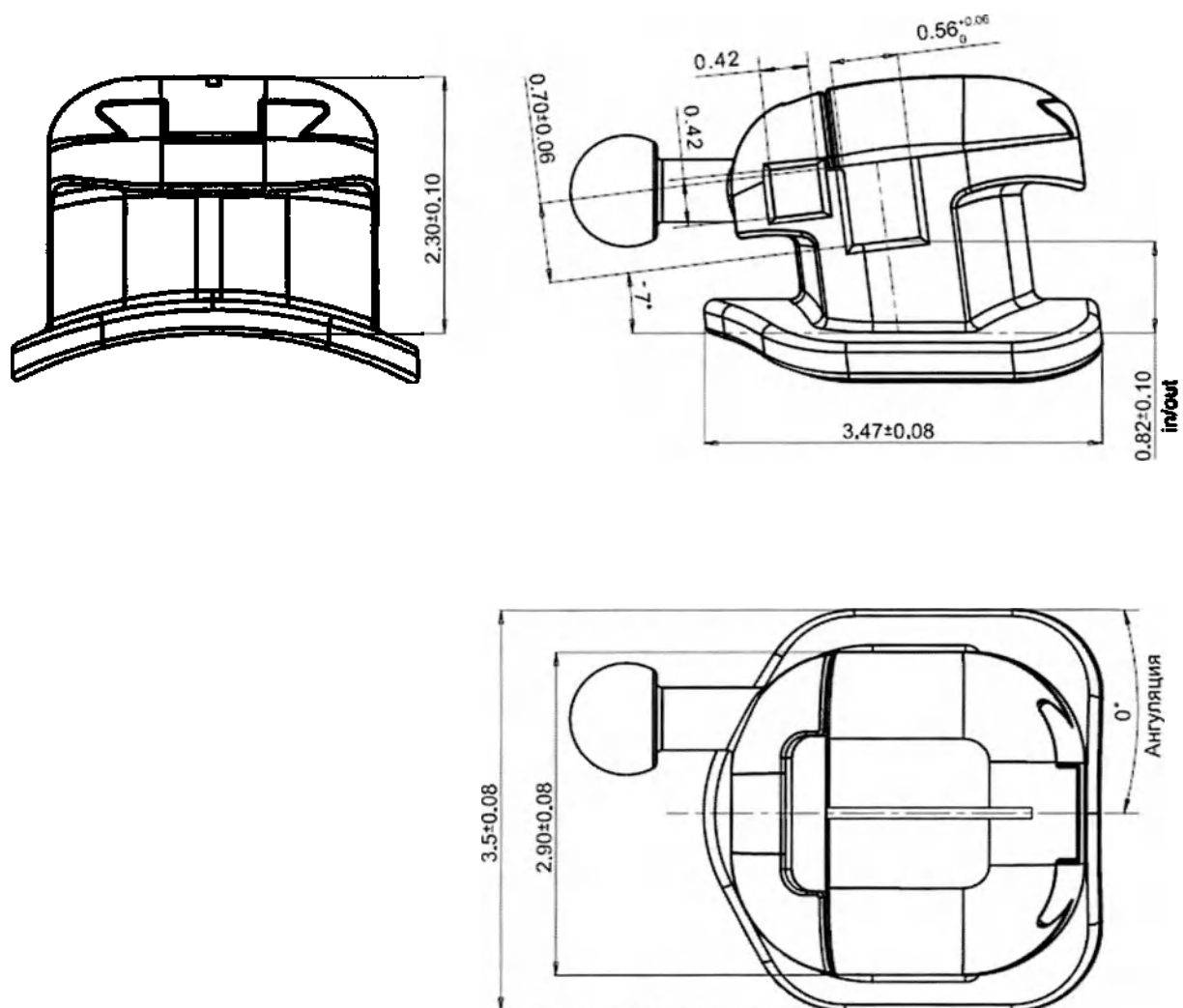


Рисунок 112. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 25 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-256(25)	-7	0	0,090

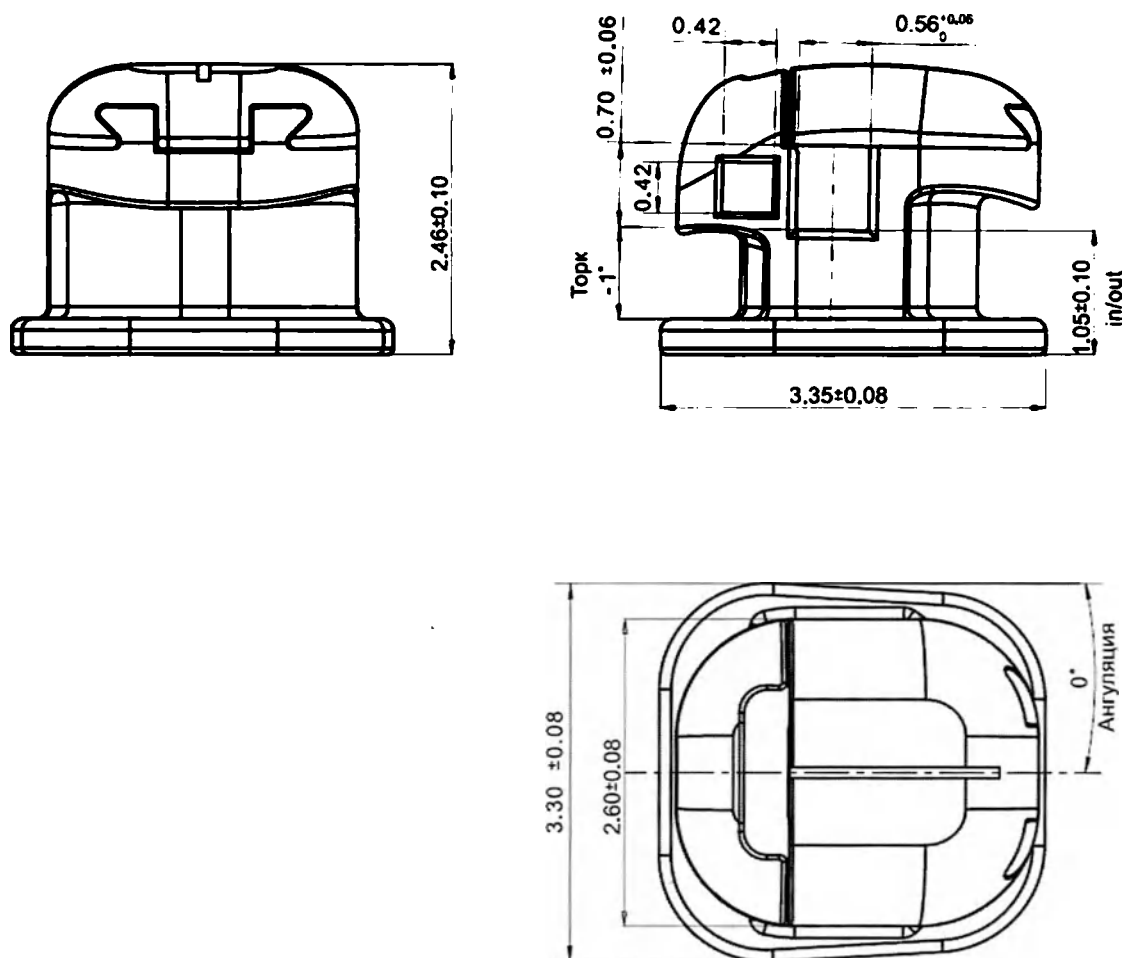


Рисунок 113. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 31 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-316(31)	-1	0	0,090

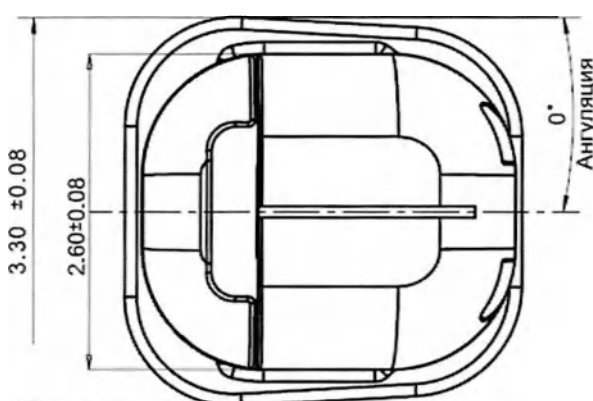
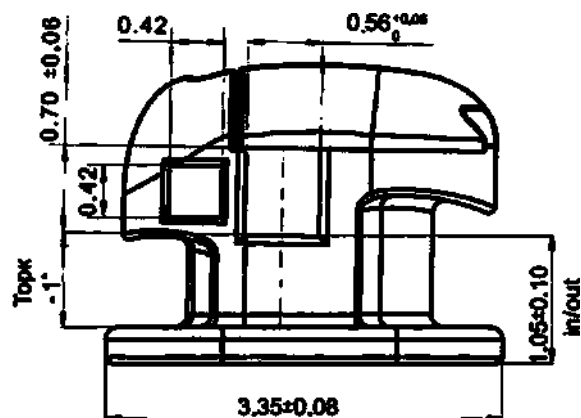
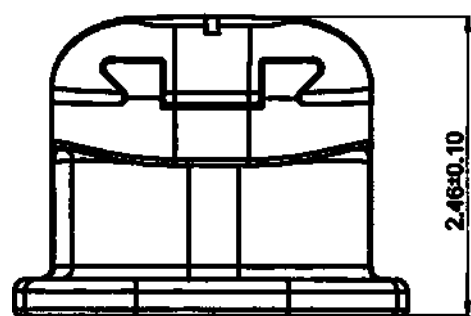


Рисунок 114. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 32 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-326(32)	-1	0	0,090

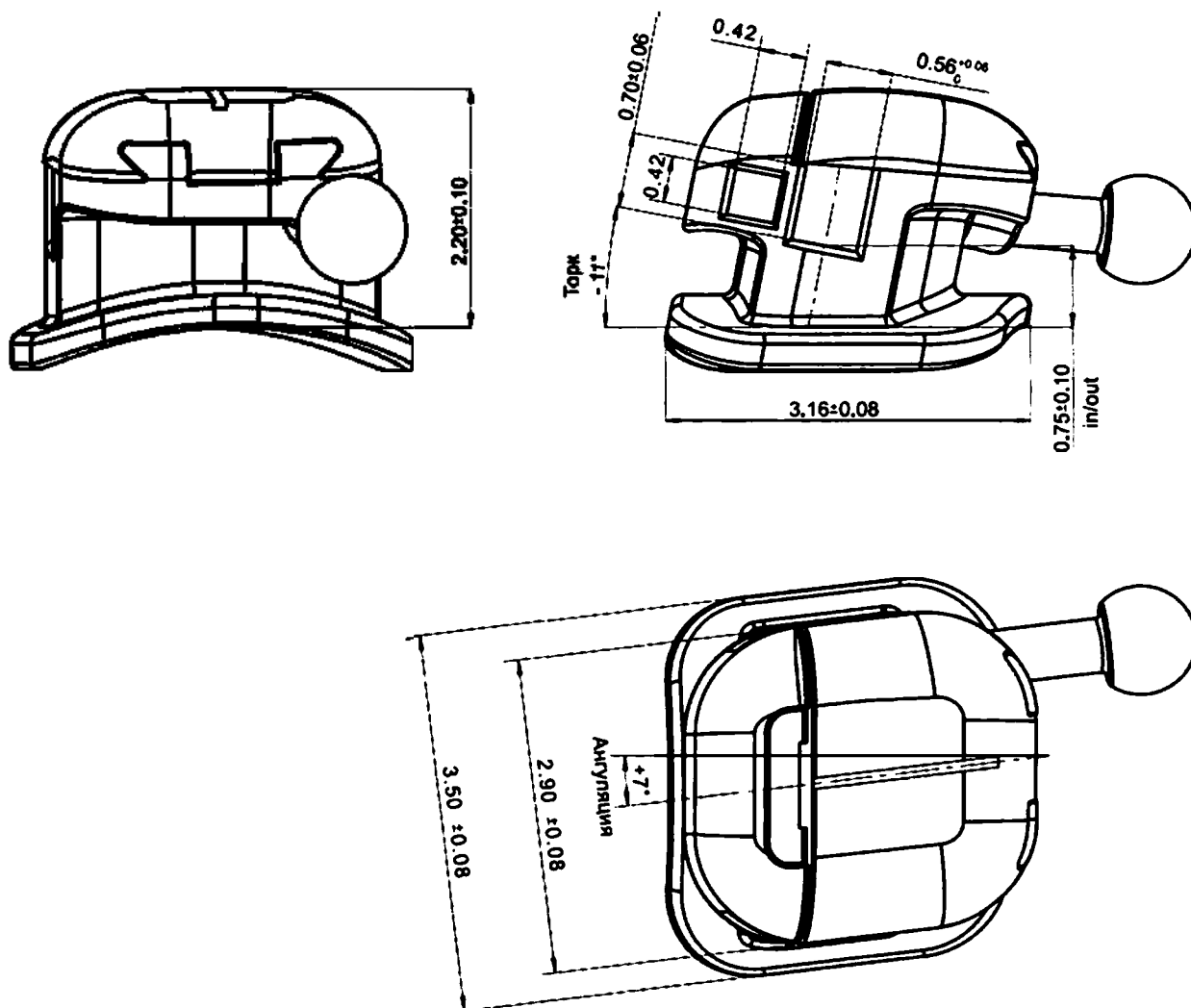


Рисунок 115. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 33 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-336(33)	-11	+7	0,095

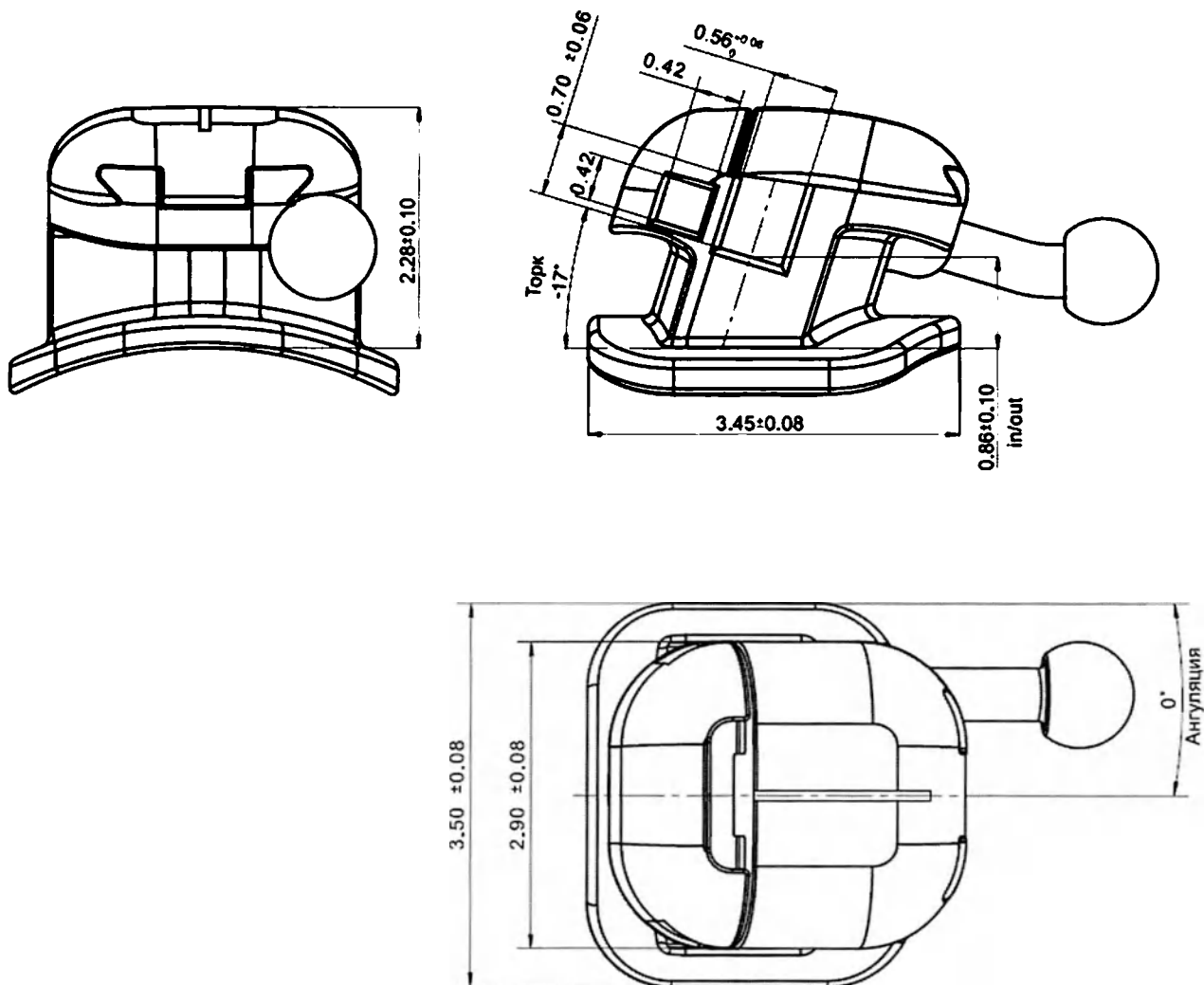


Рисунок 116. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 34 зуба, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-346(34)	-17	0	0,095

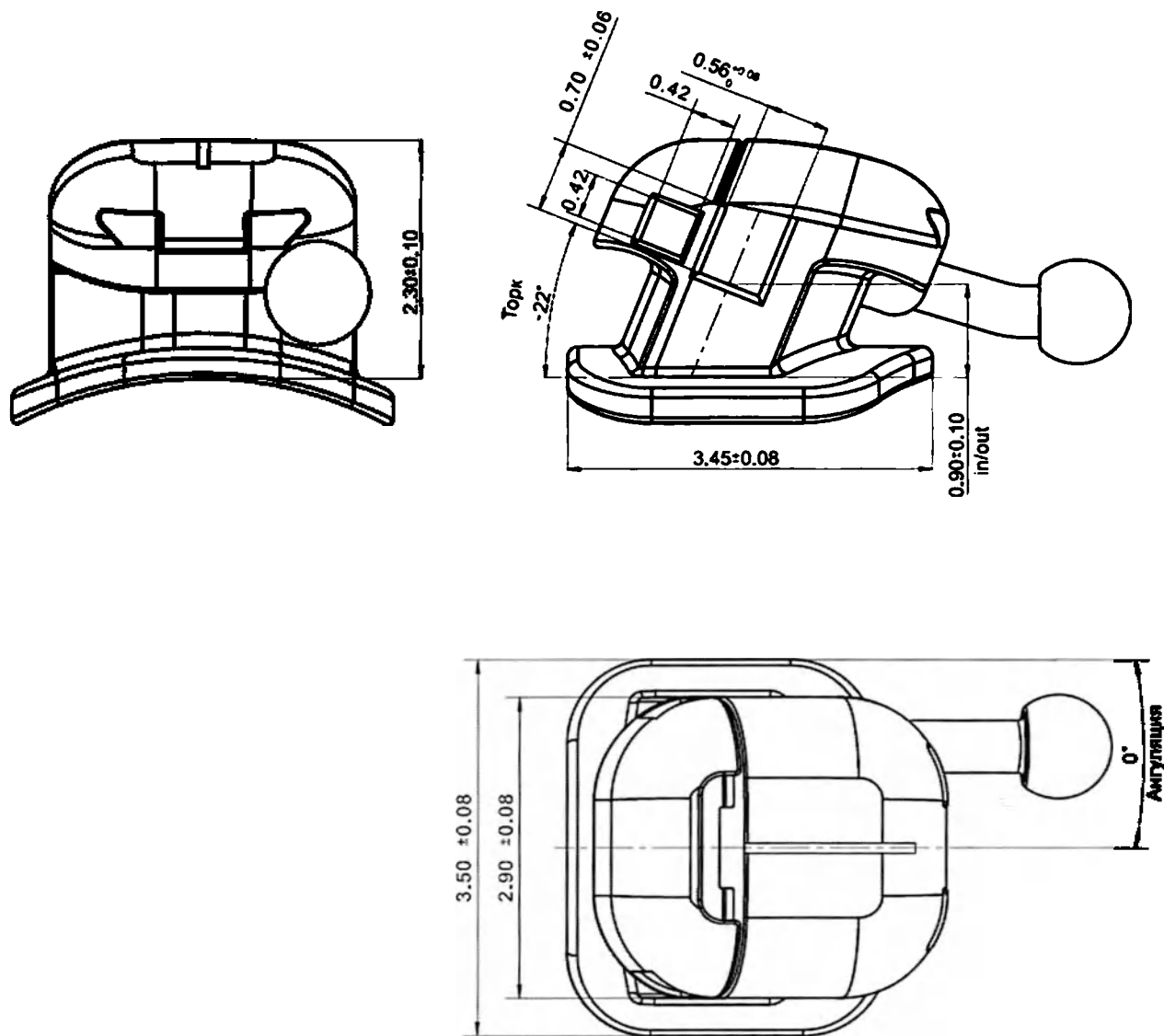


Рисунок 117. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 35 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-356(35)	-22	0	0,095

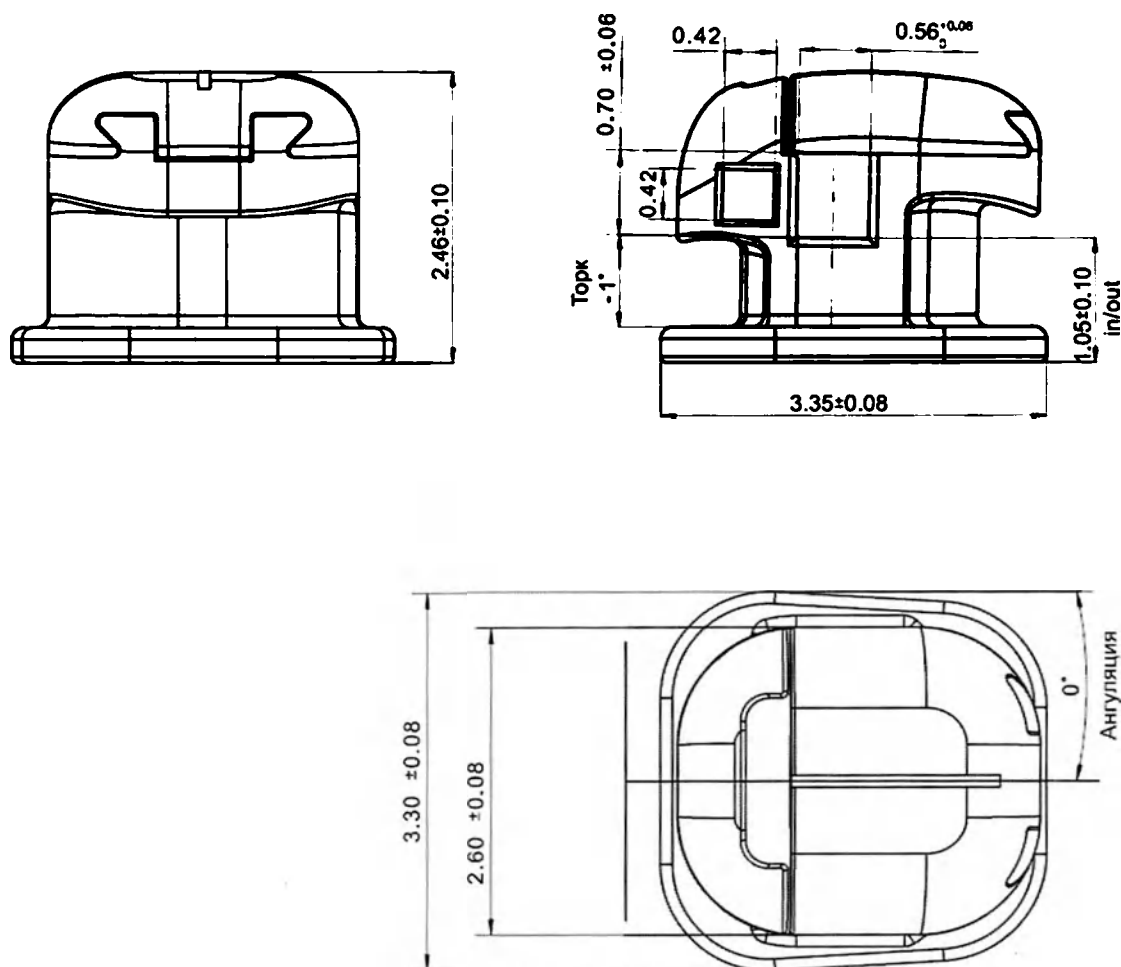


Рисунок 118. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 41 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-416(41)	-1	0	0,095

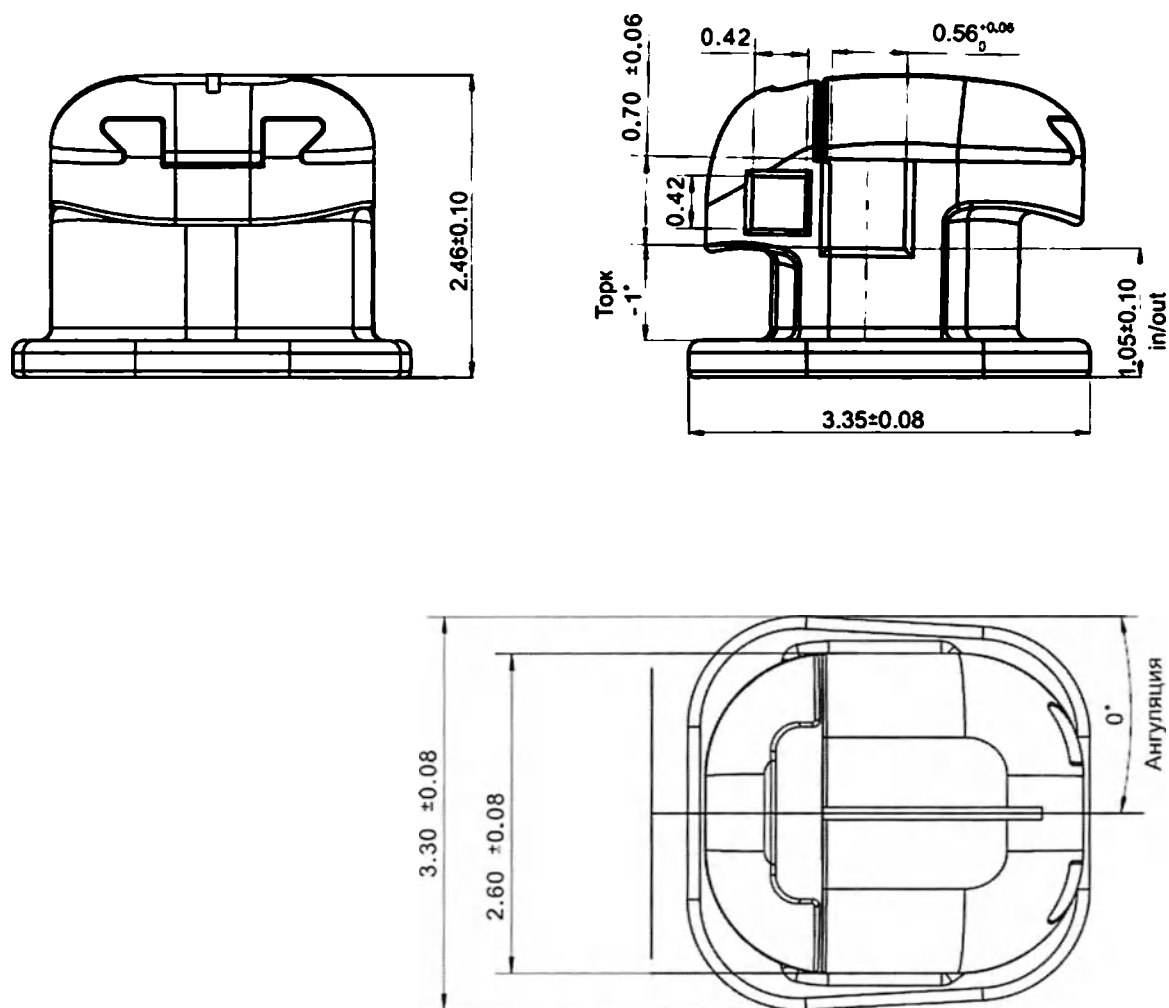


Рисунок 119. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 42 зуб, без крючка, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
62-426(42)	-1	0	0,090

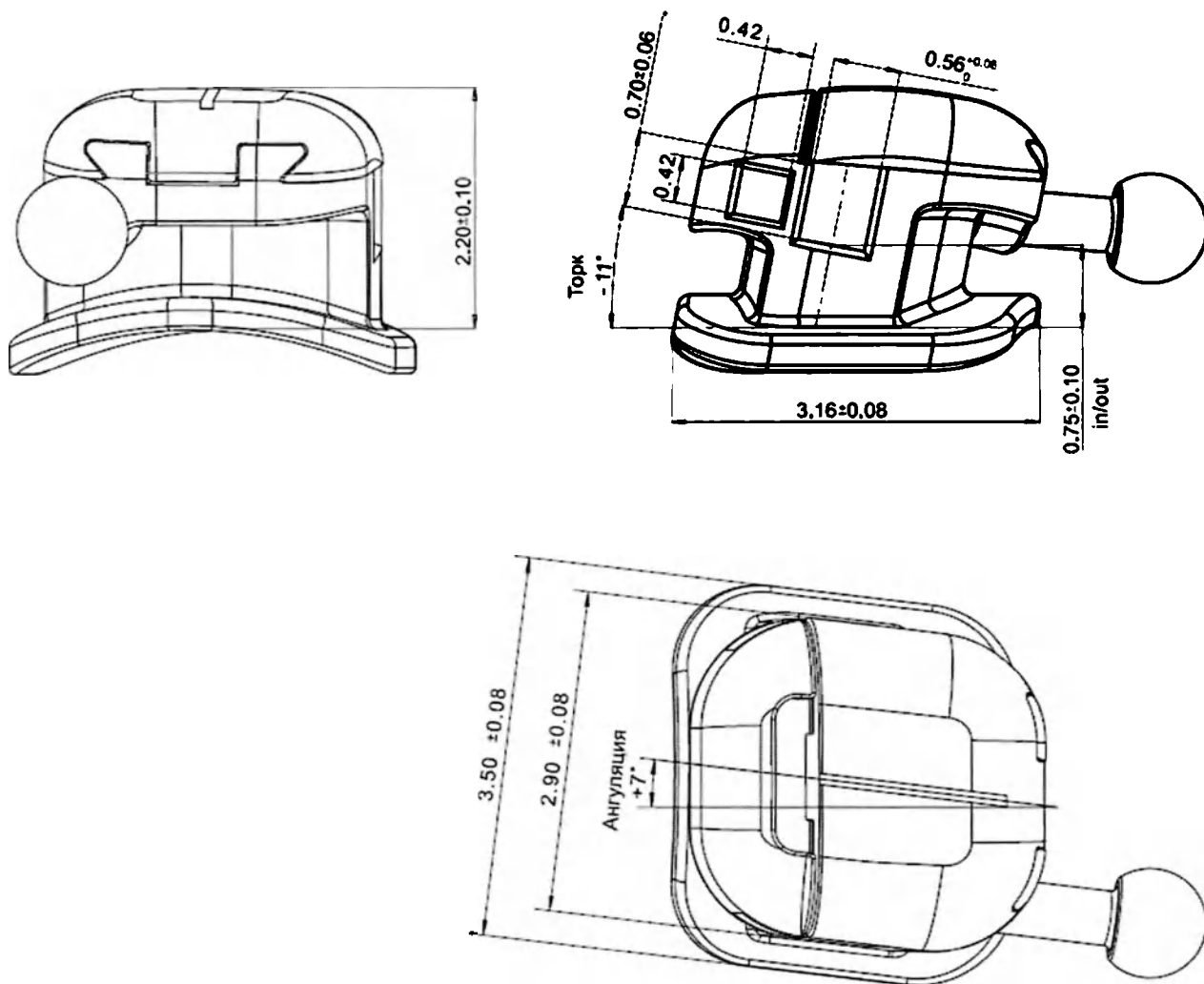


Рисунок 120. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 43 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-436(43)	-11	+7	0,095

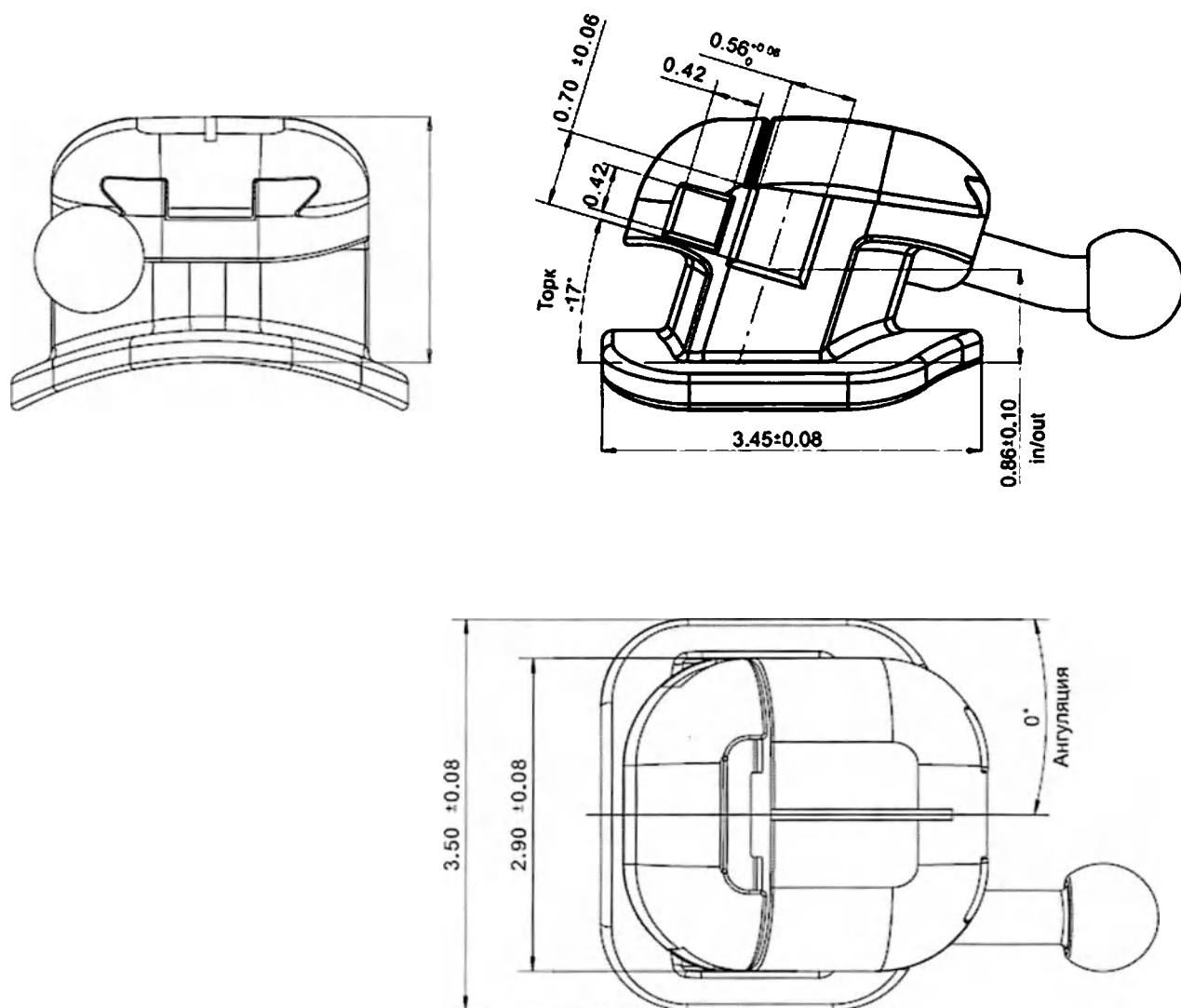


Рисунок 121. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 44 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-446(44)	-17	0	0,090

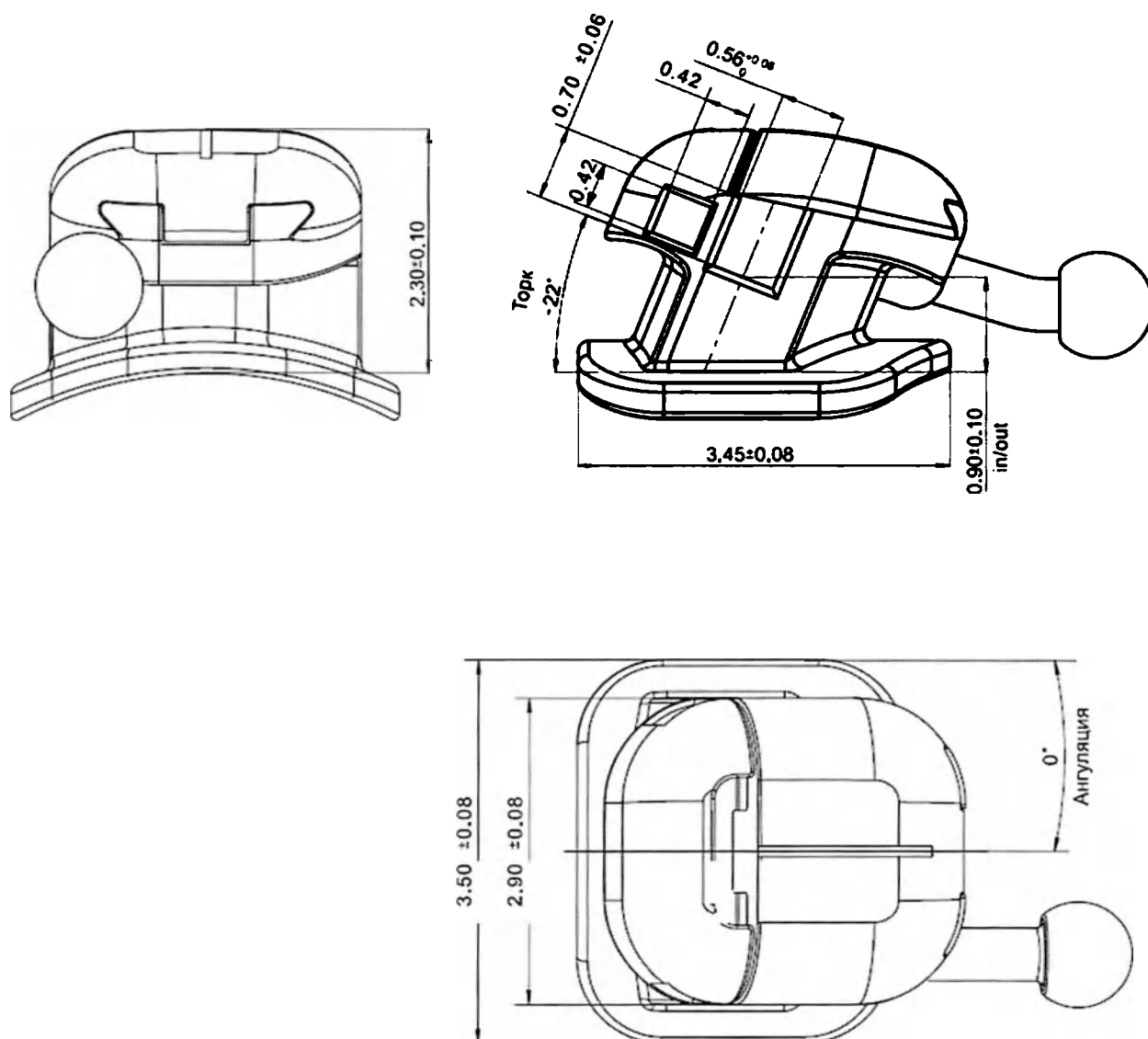


Рисунок 122. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 45 зуб, с крючком, пропись Roth

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
61-456(45)	-22	0	0,095

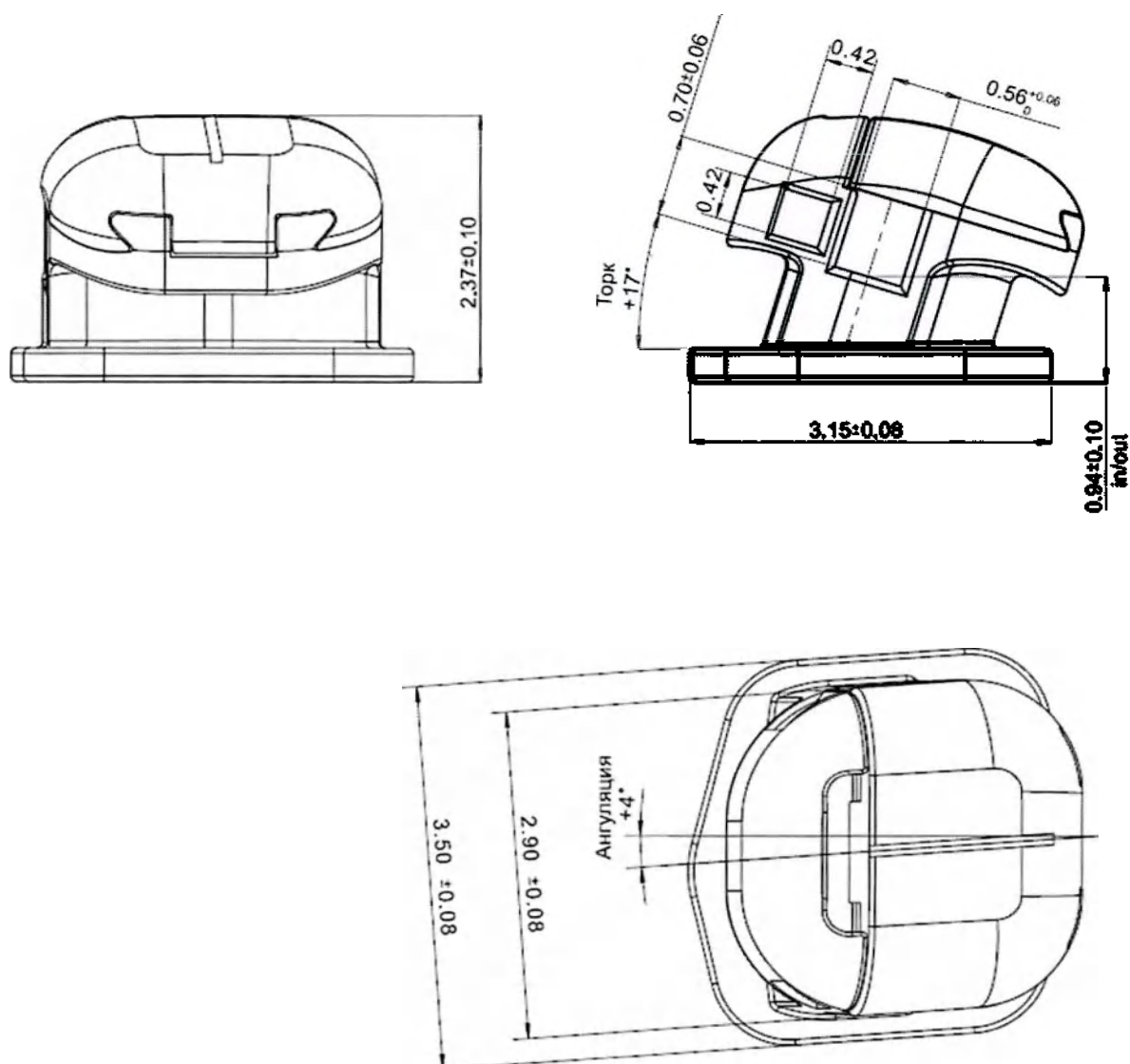


Рисунок 123. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 11 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-114(11)	+17	+4	0,090

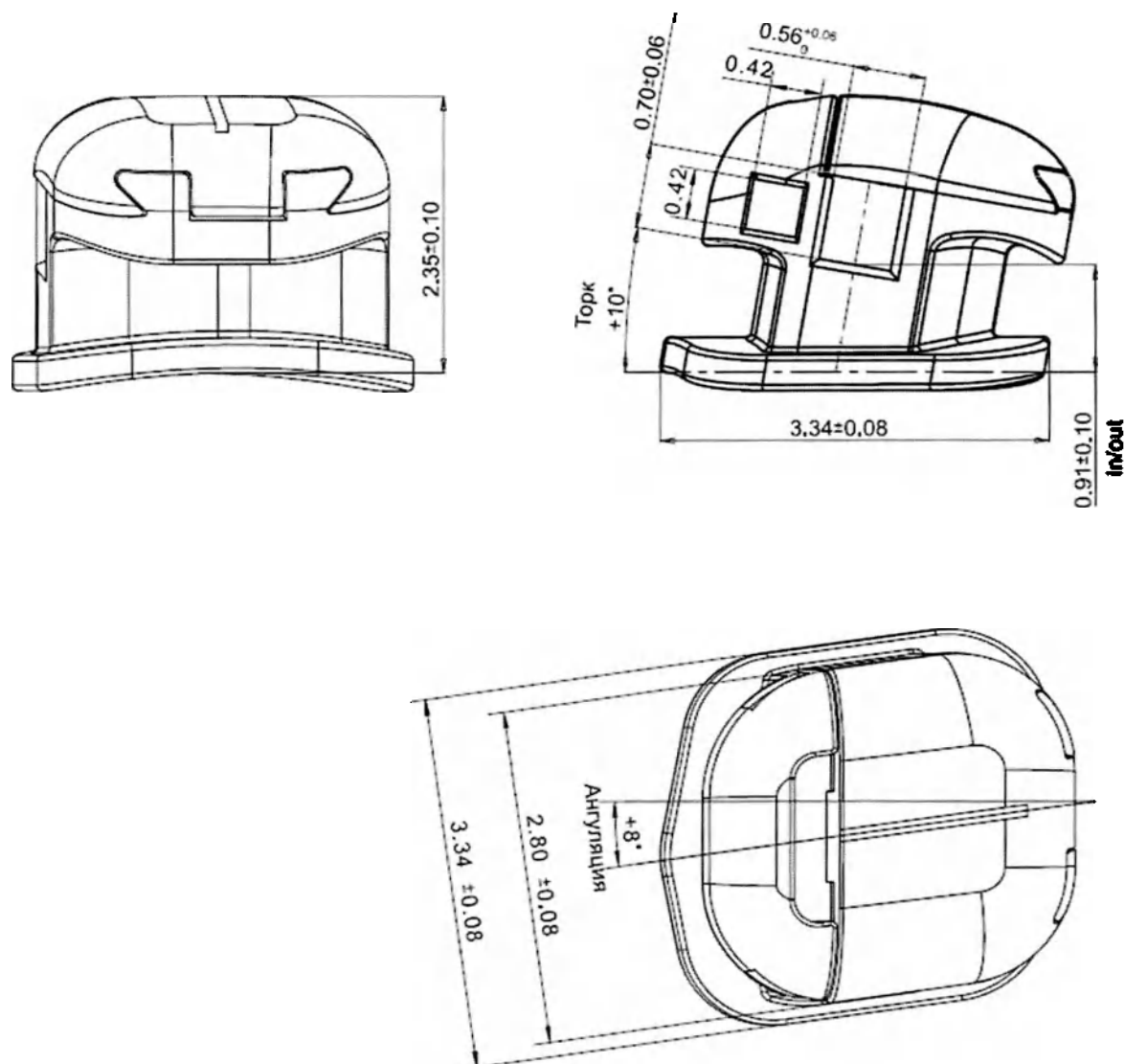


Рисунок 124. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 12 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-124(12)	+10	+8	0,095

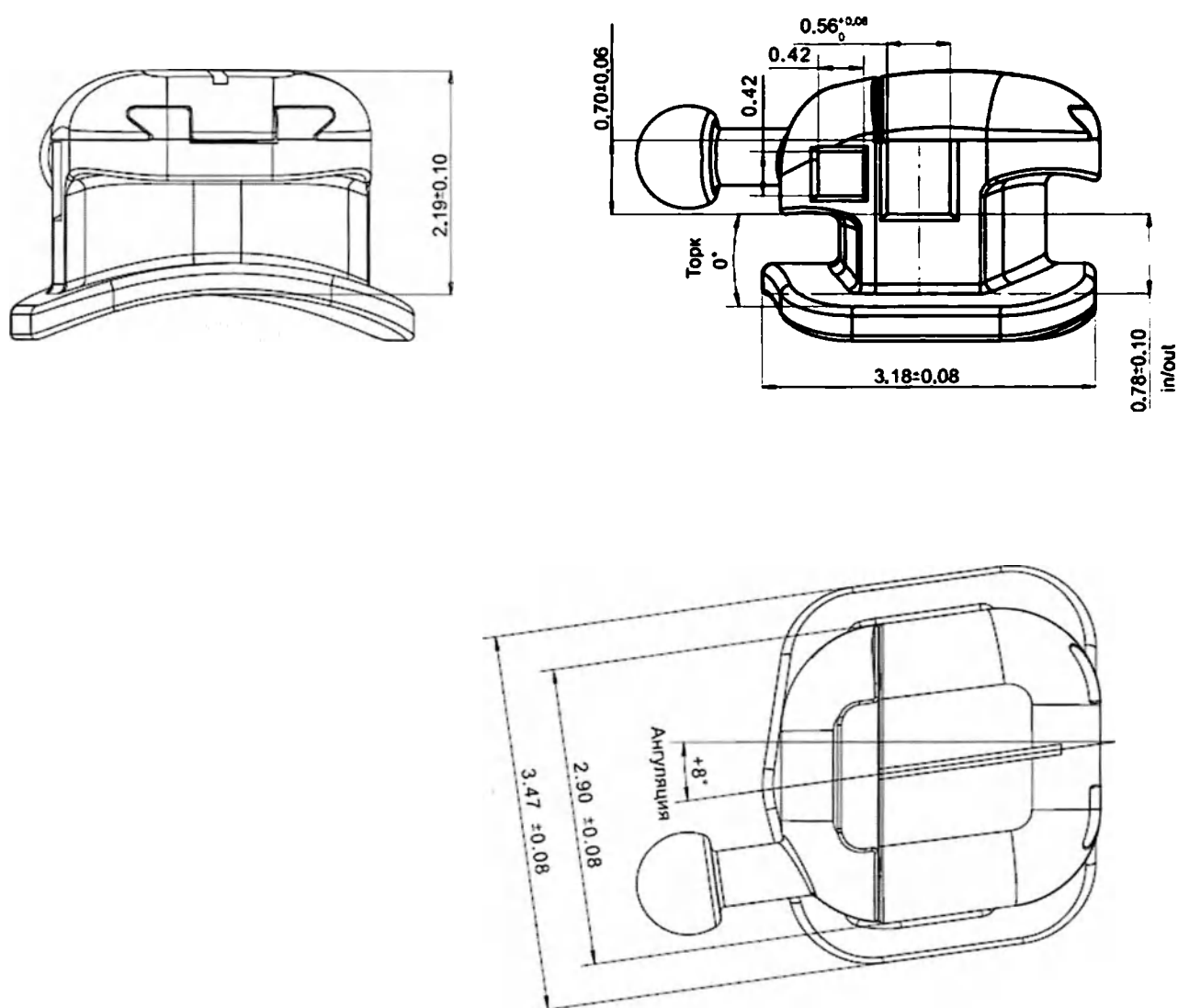


Рисунок 125. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 13 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-134(13)	0	+8	0,095

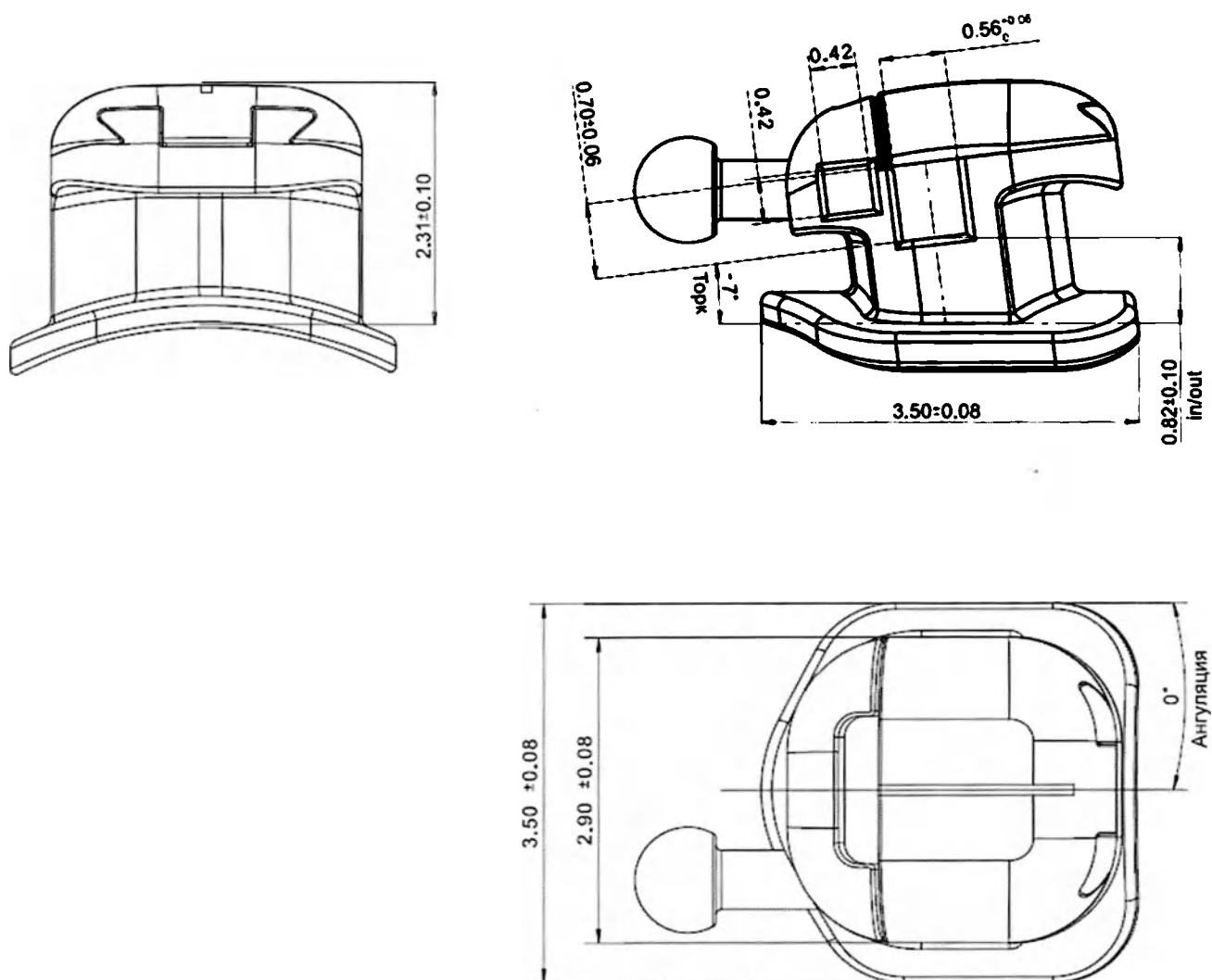


Рисунок 126. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 14 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-144(14)	-7	0	0,095

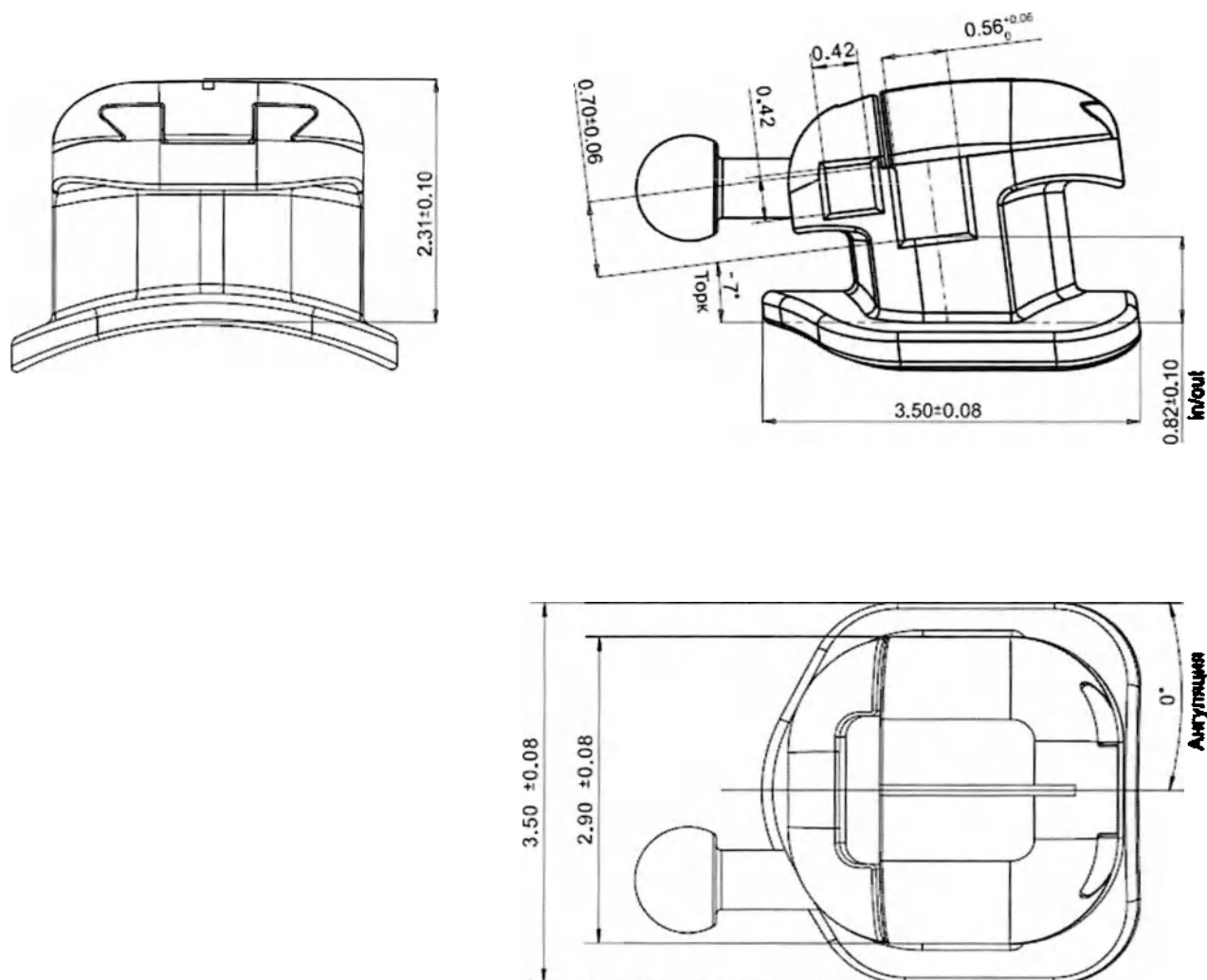


Рисунок 127. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 15 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-154(15)	-7	0	0,095

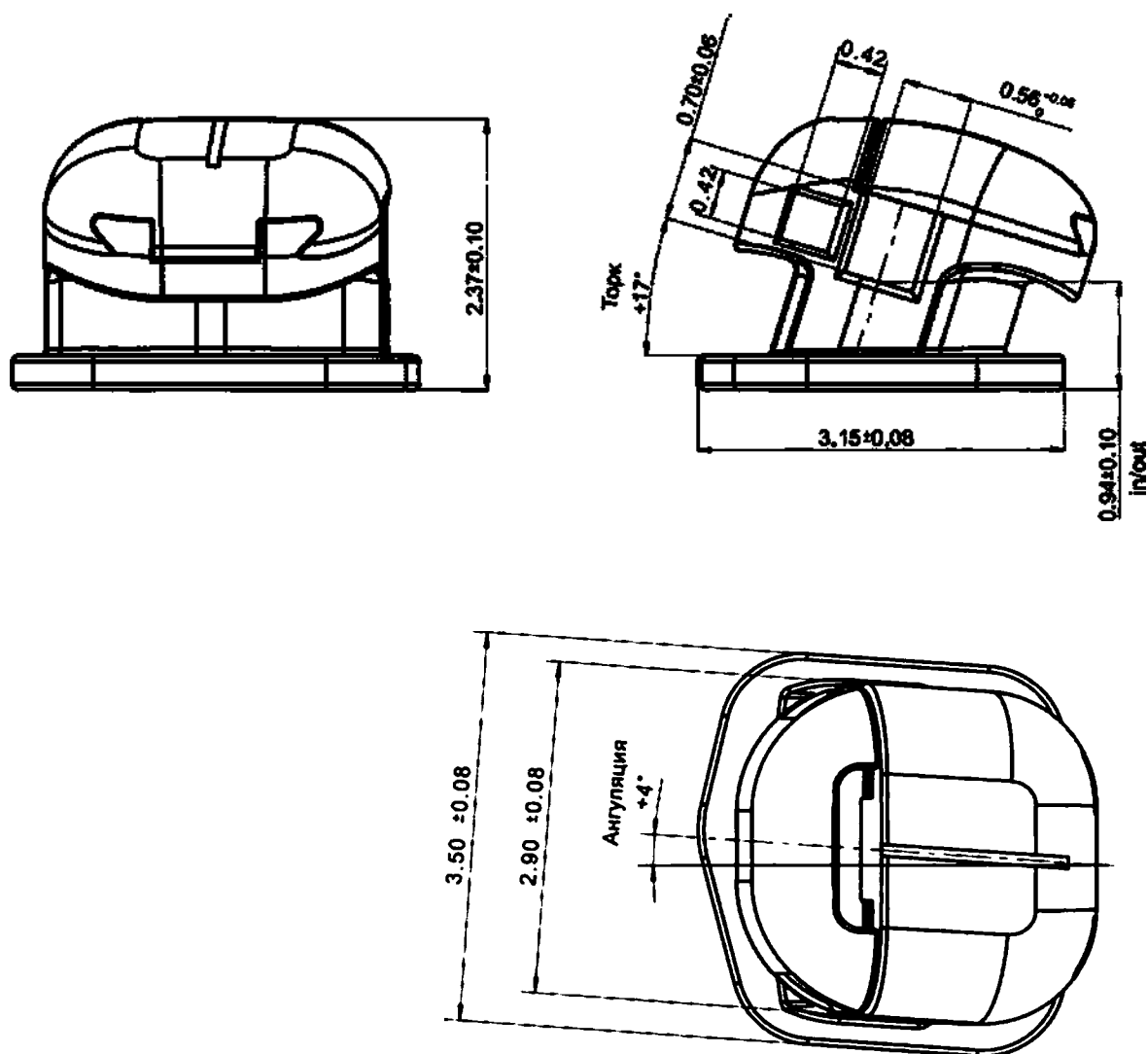


Рисунок 128. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 21 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-214(21)	+17	+4	0,090

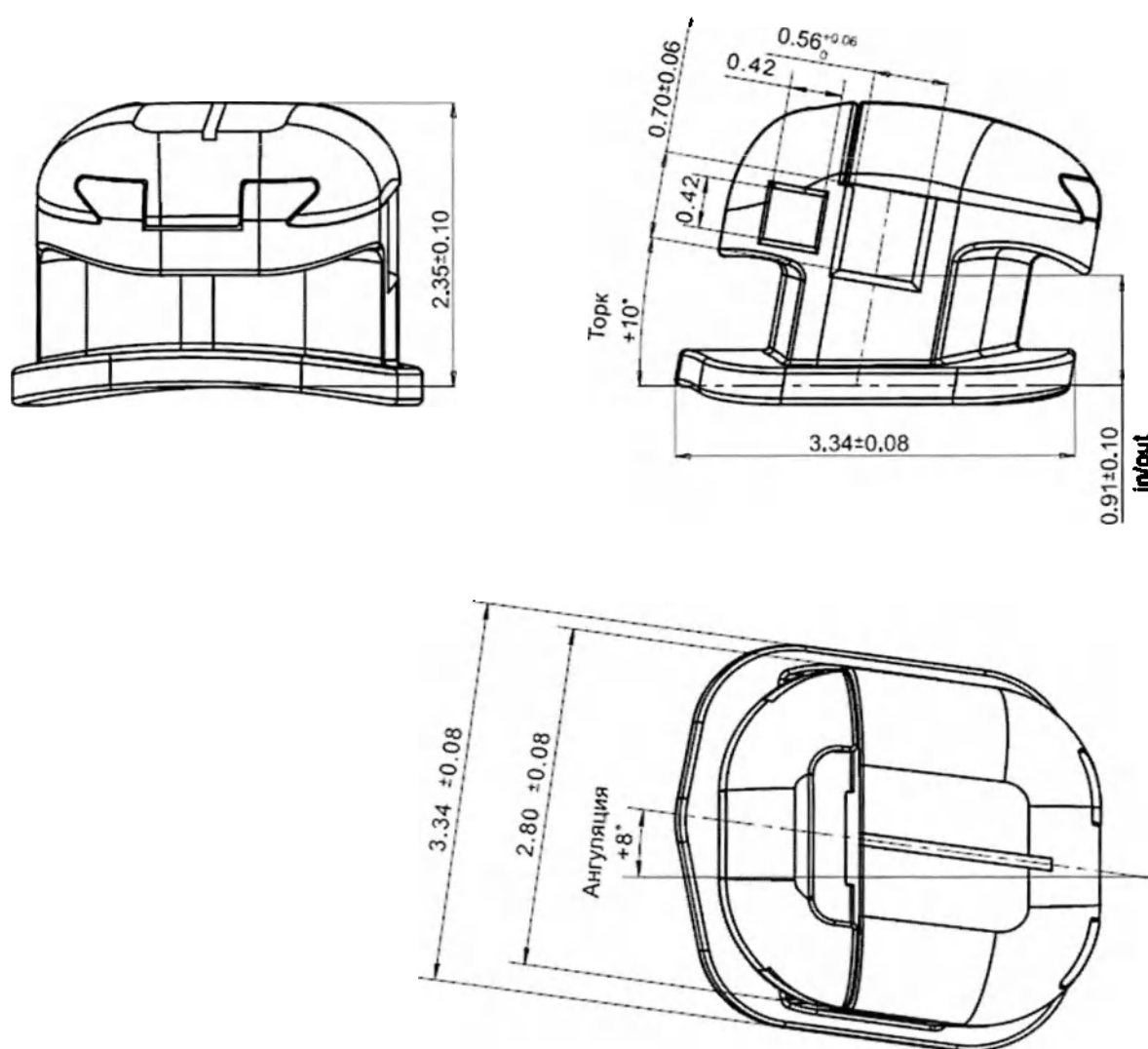


Рисунок 129. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 22 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-224(22)	+10	+8	0,090

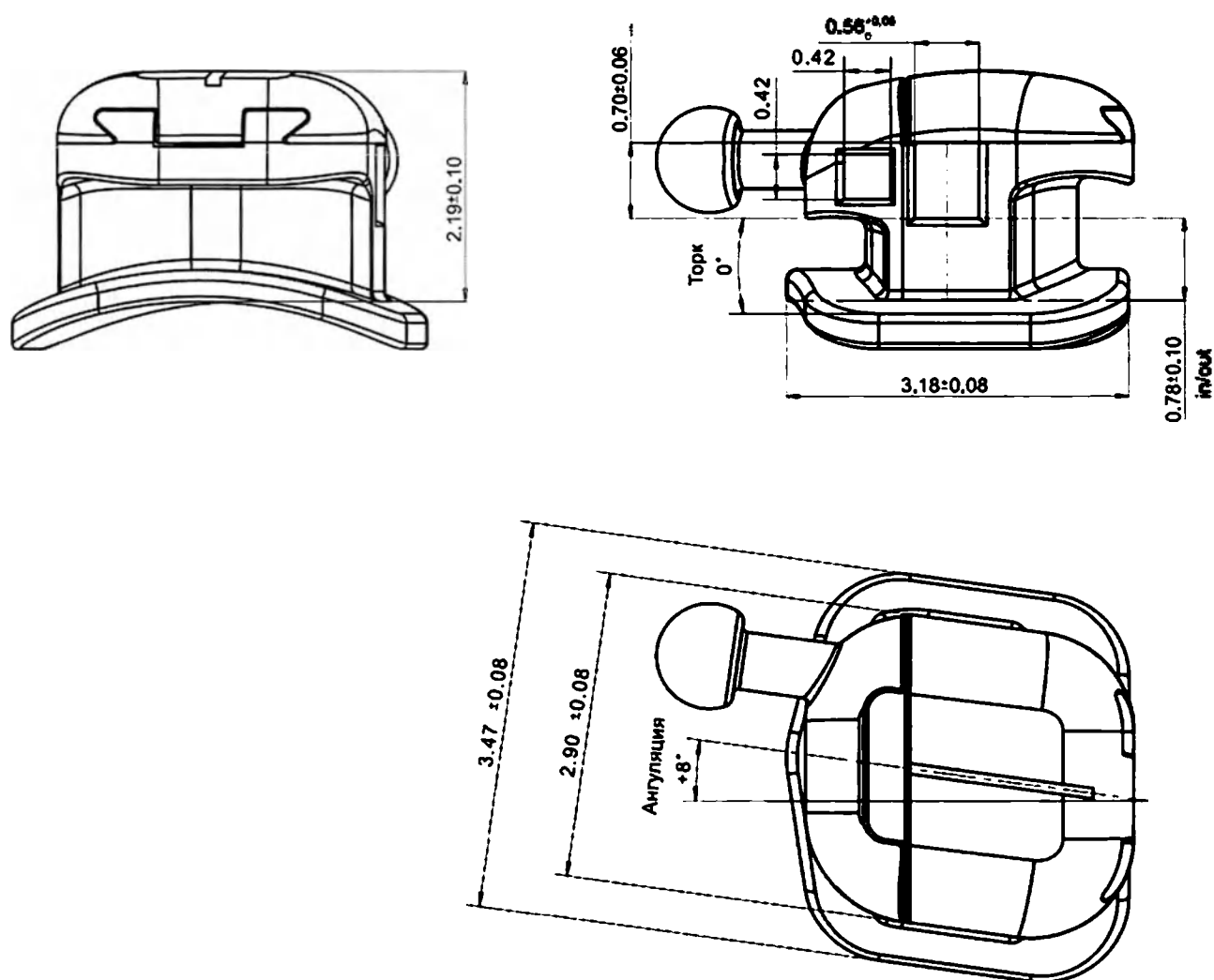


Рисунок 130. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 23 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-234(23)	0	+8	0,095

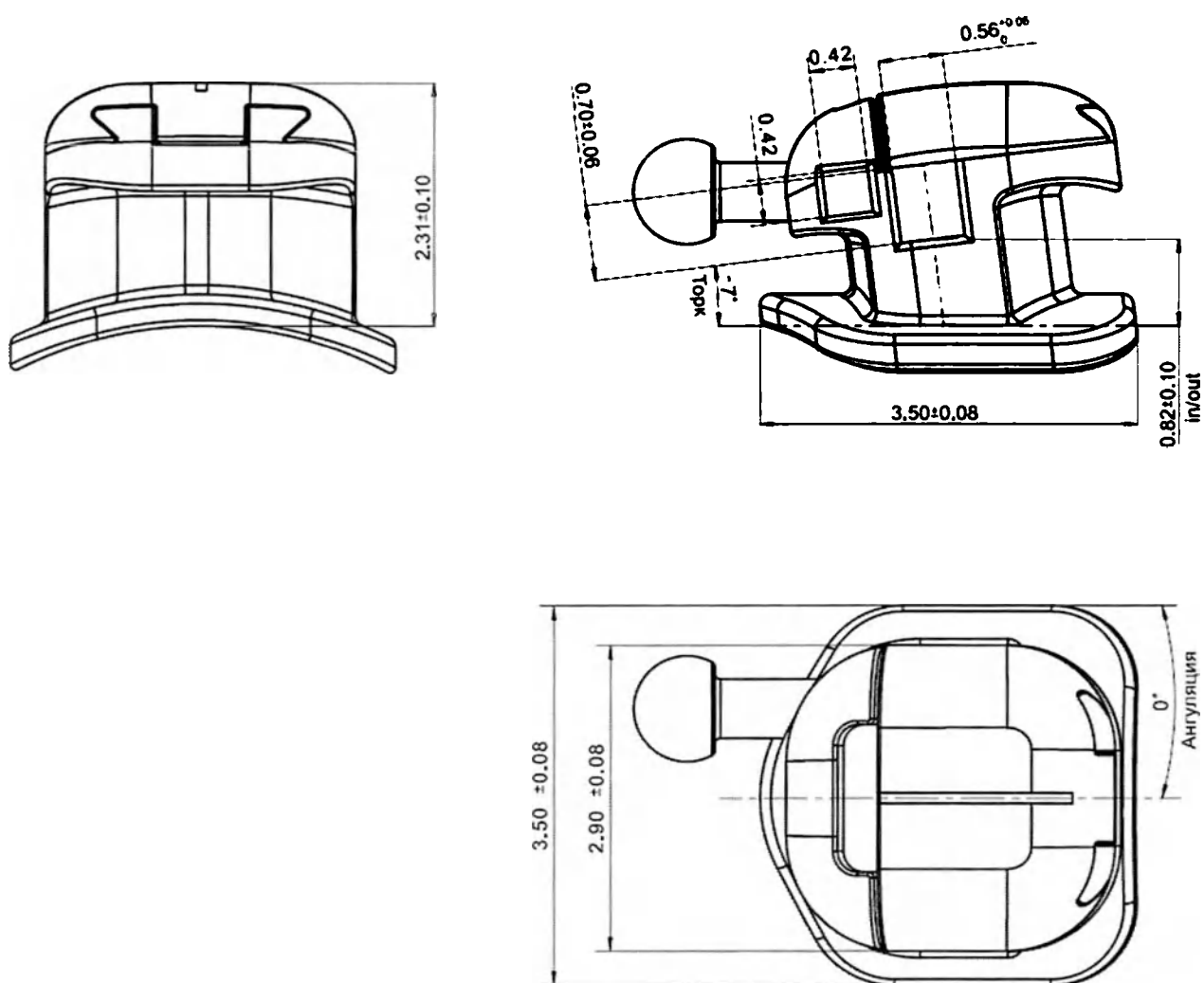


Рисунок 131. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 24 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-244(24)	-7	0	0,095

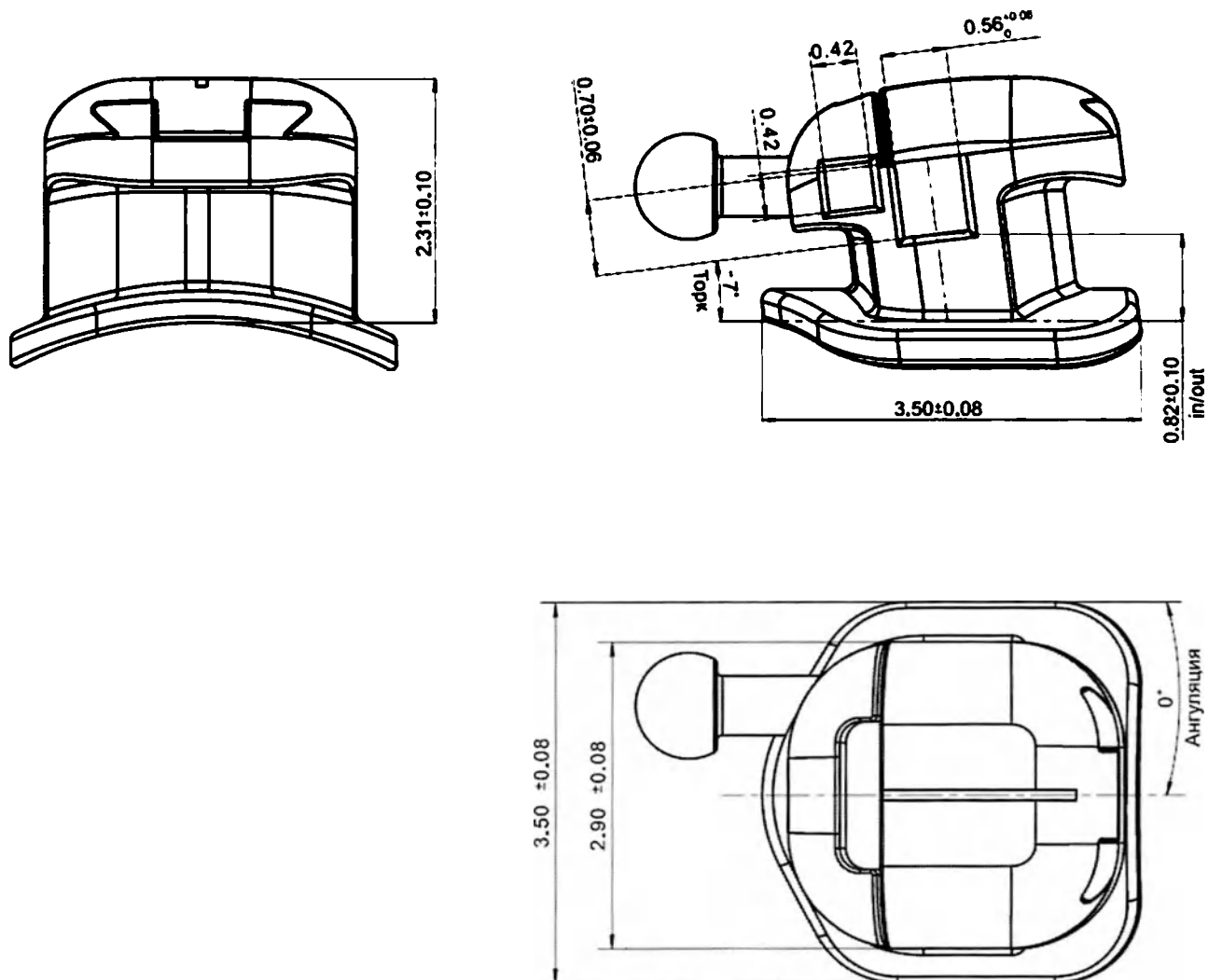


Рисунок 132. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 25 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-254(25)	-7	0	0,095

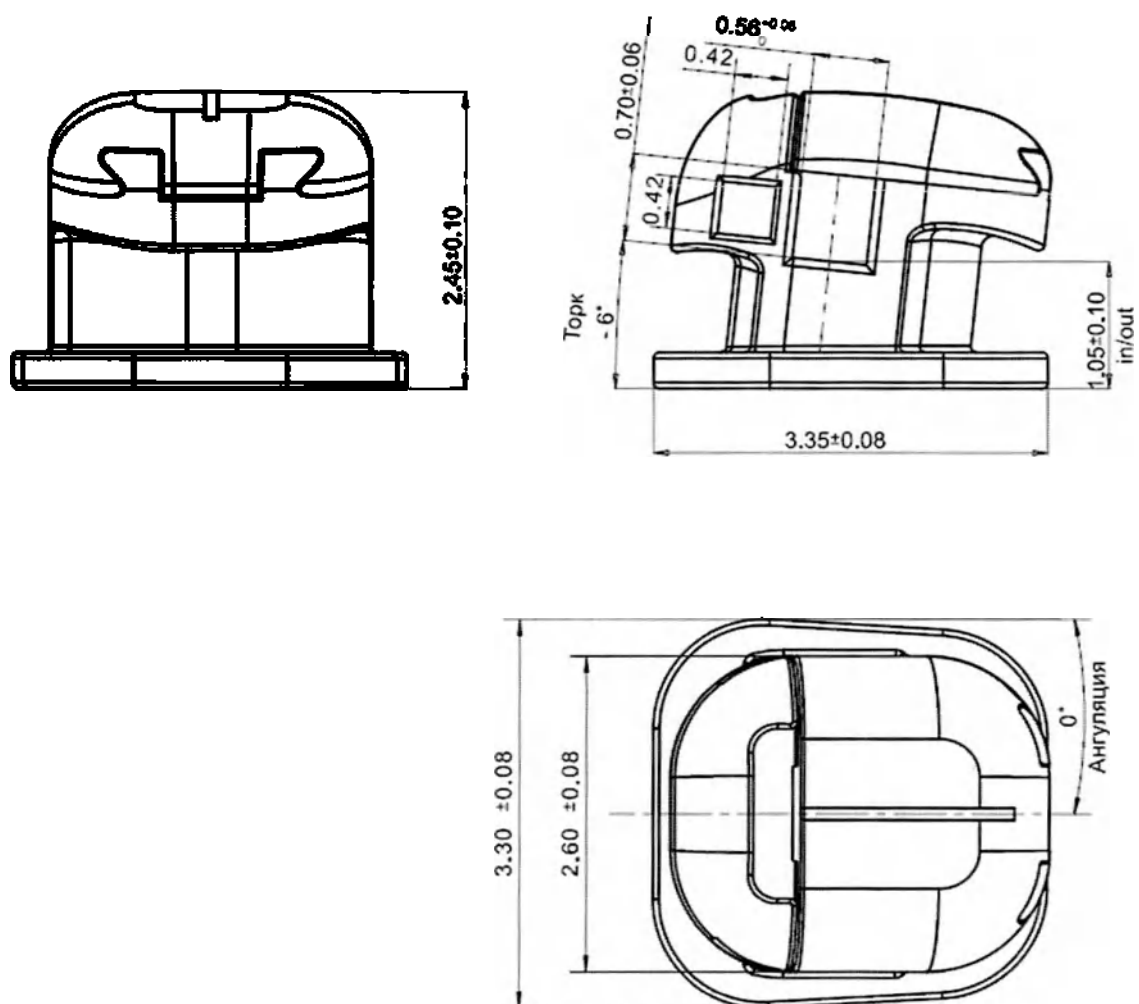


Рисунок 133. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 31 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-314(31)	-6	0	0,090

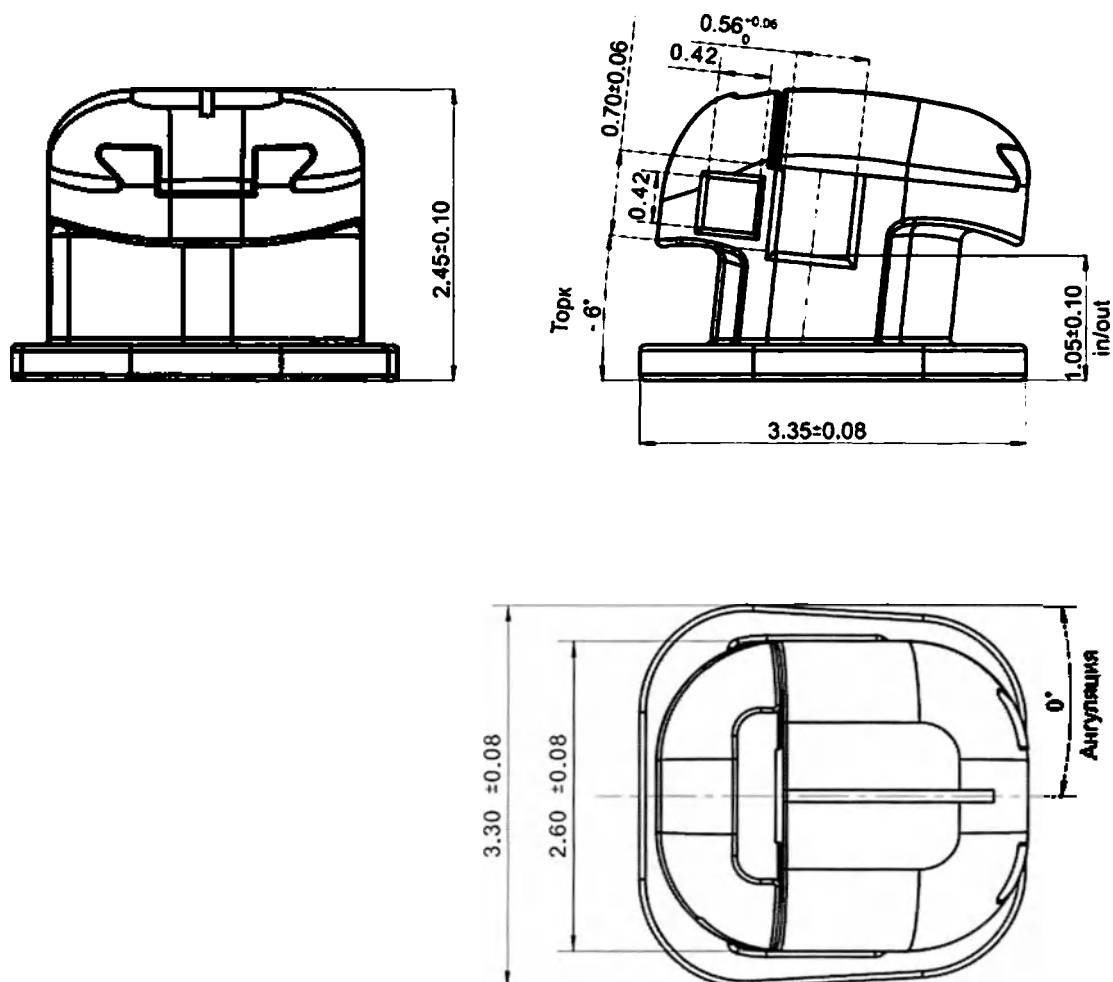


Рисунок 134. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 32 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-324(32)	-6	0	0,090

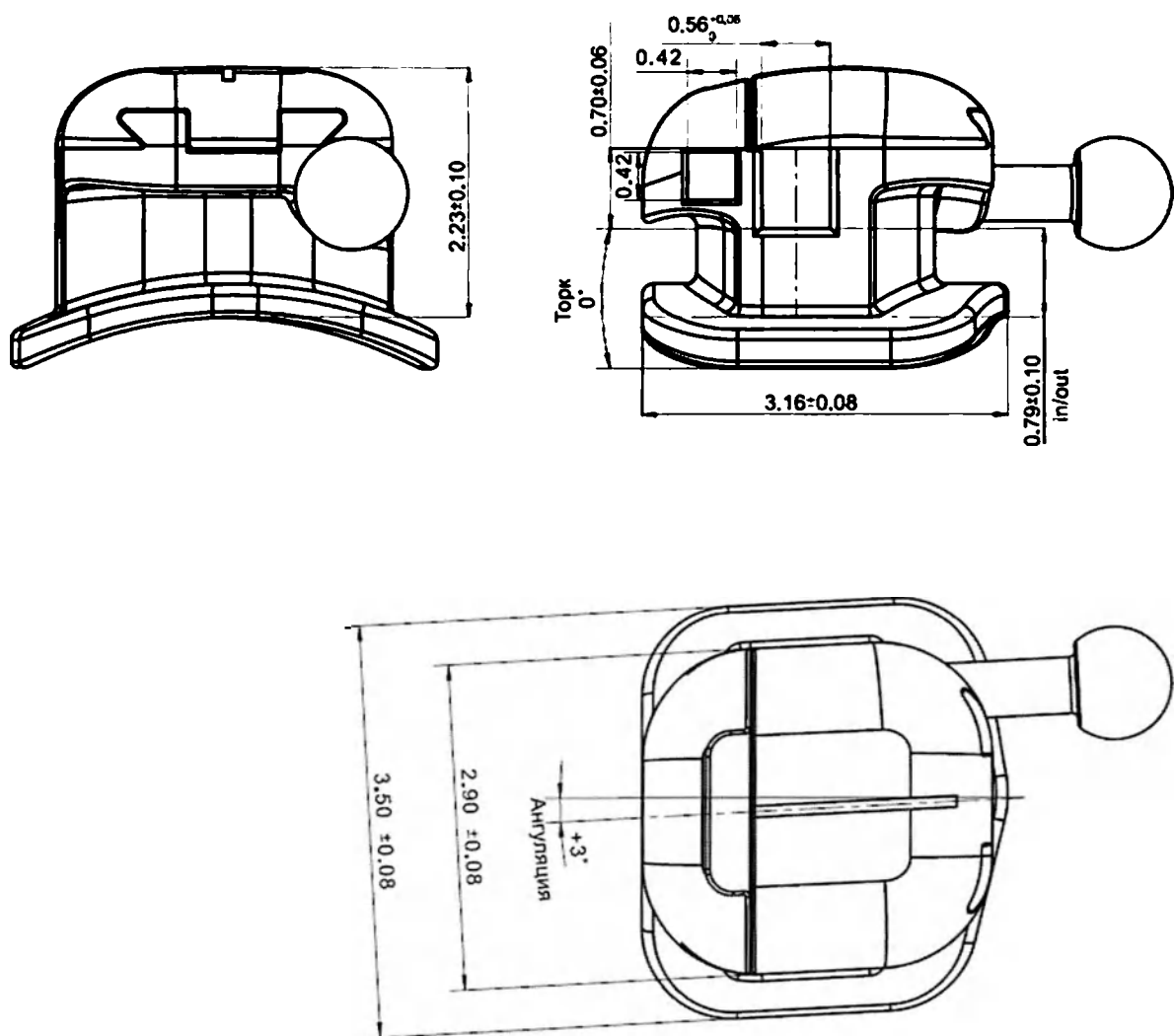


Рисунок 136. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 33 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-334(33)	0	+3	0,095

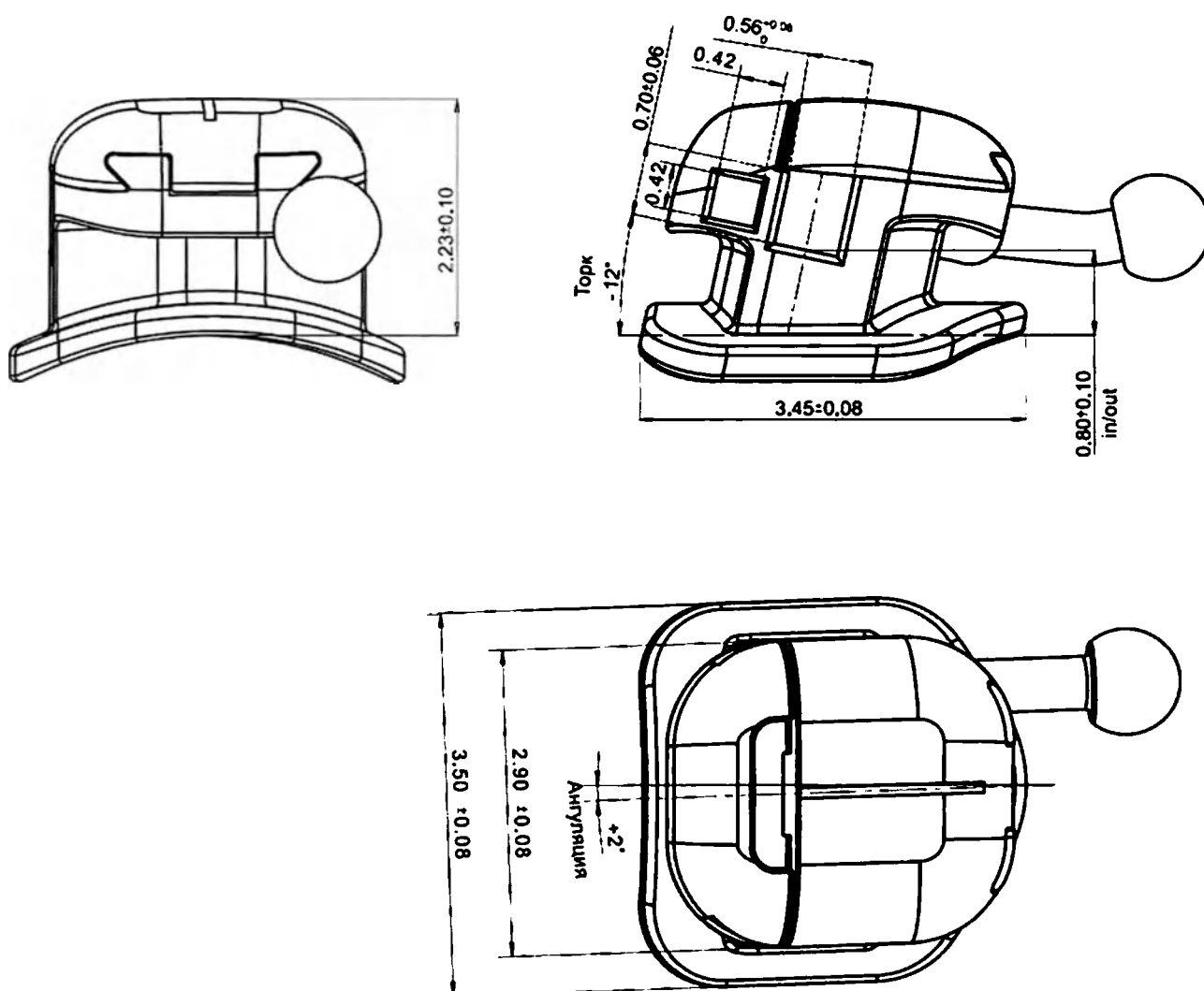


Рисунок 137. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 34 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-344(34)	-12	+2	0,095

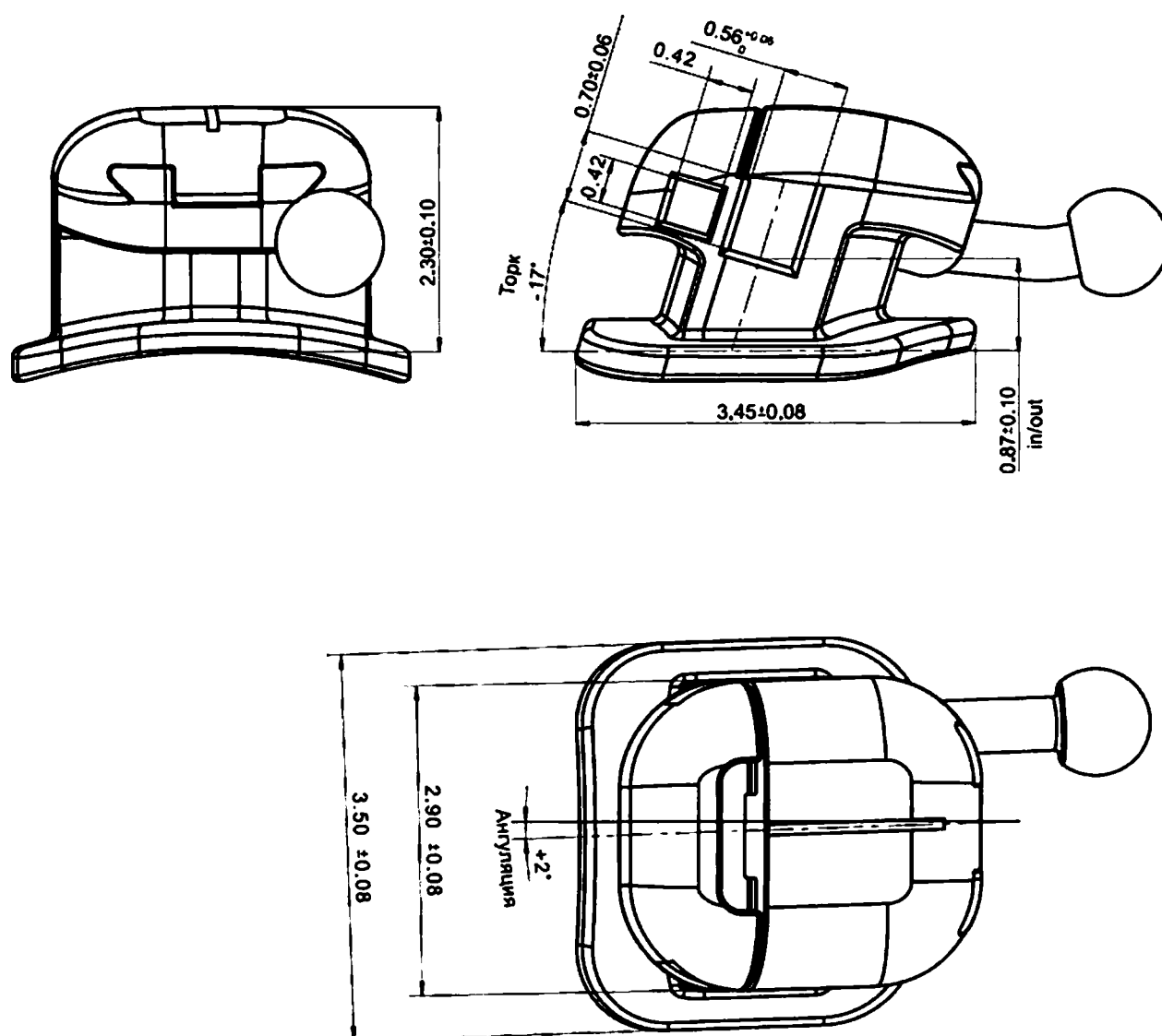


Рисунок 138. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 35 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-354(35)	-17	+2	0,095

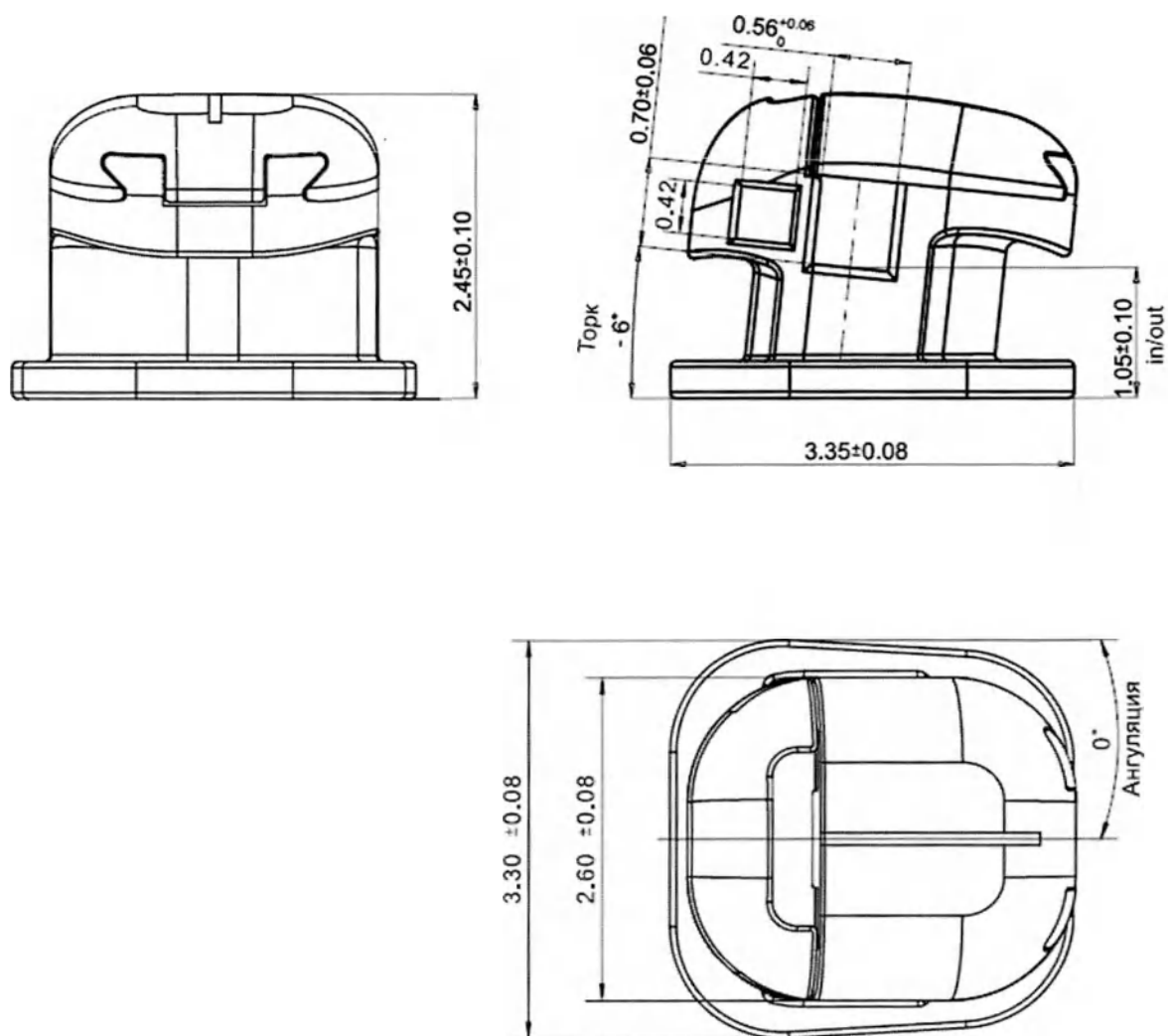


Рисунок 139. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 41 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-414(41)	-6	0	0,090

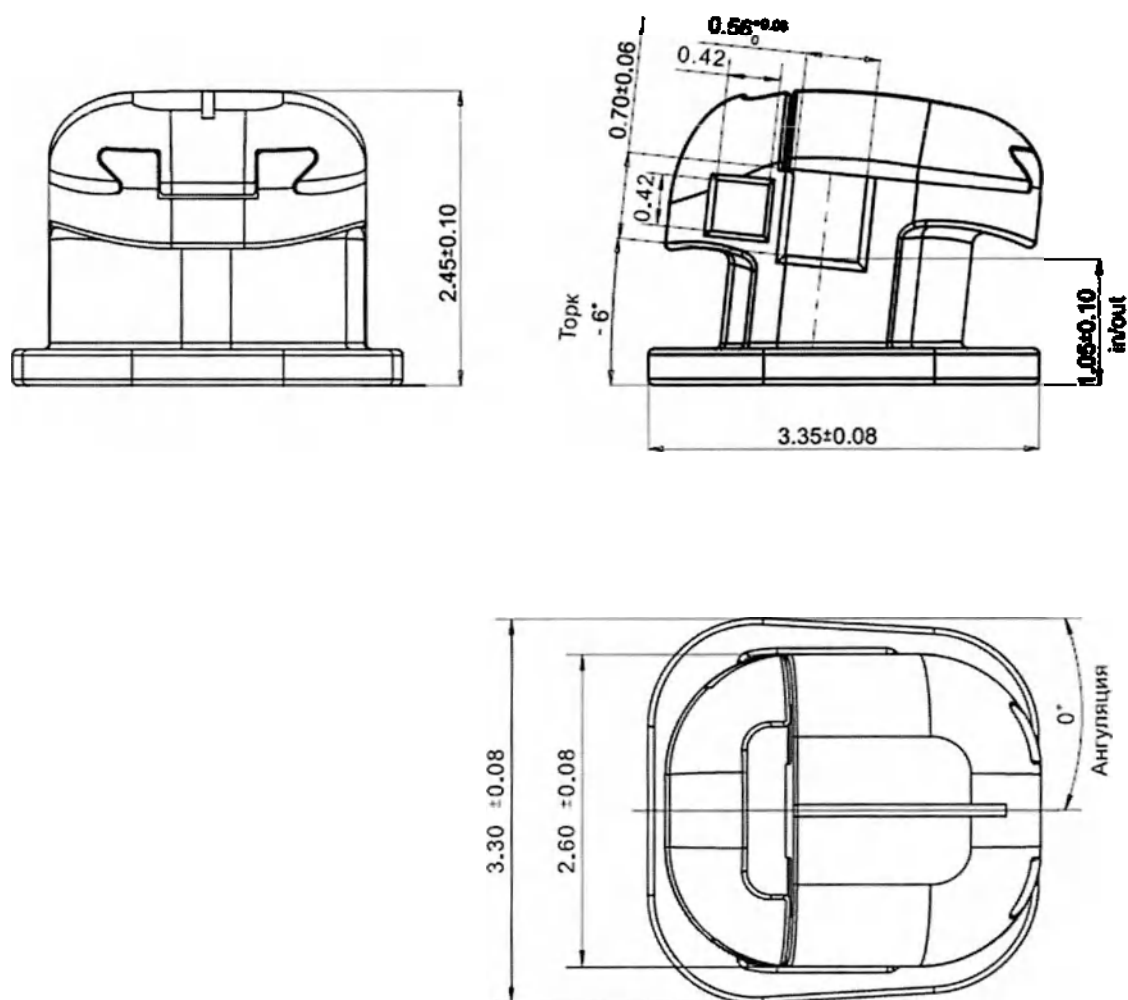


Рисунок 140. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 42 зуб, без крючка, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
32-424(42)	-6	0	0,090

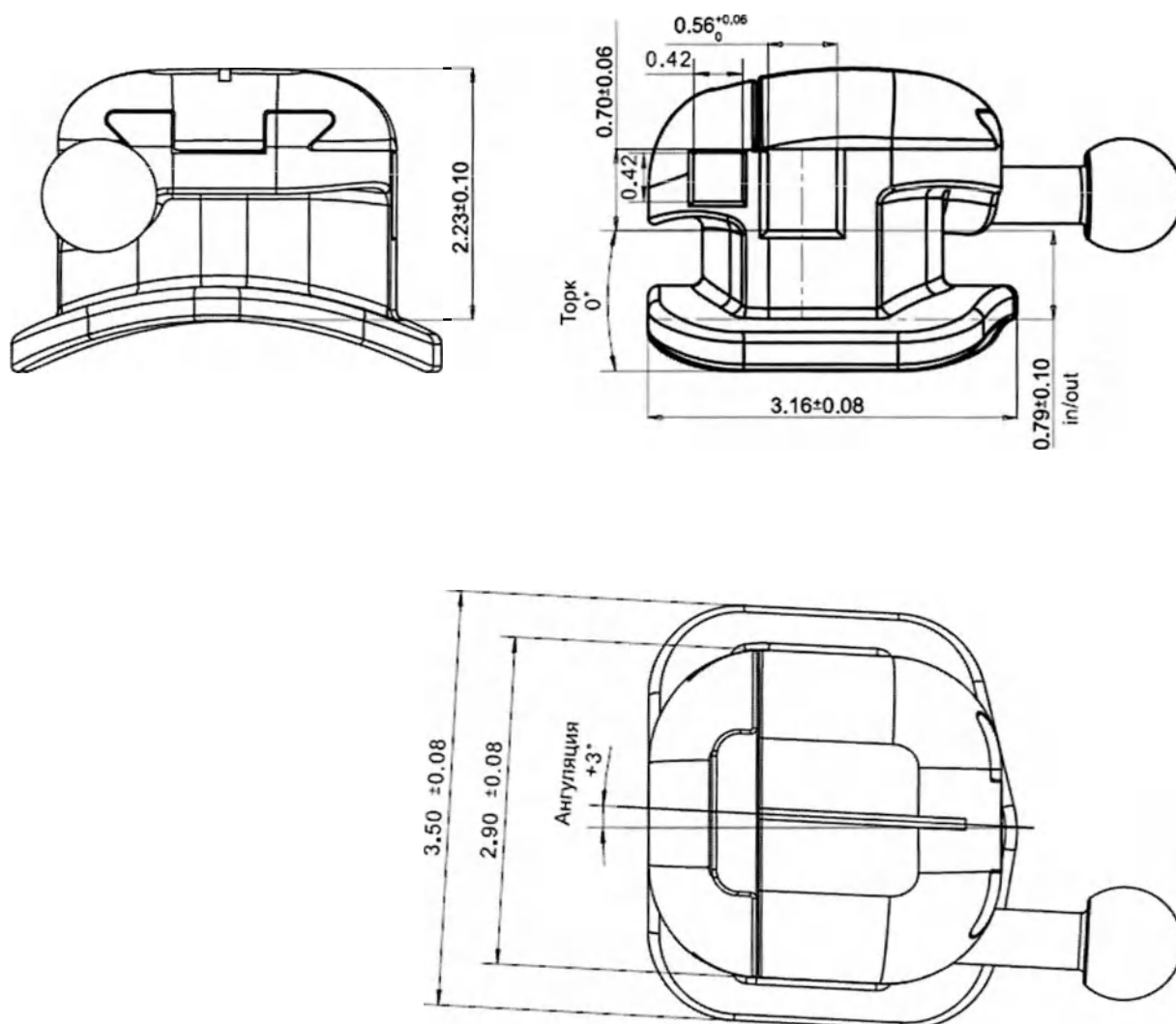


Рисунок 141. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 43 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-434(43)	0	+3	0,095

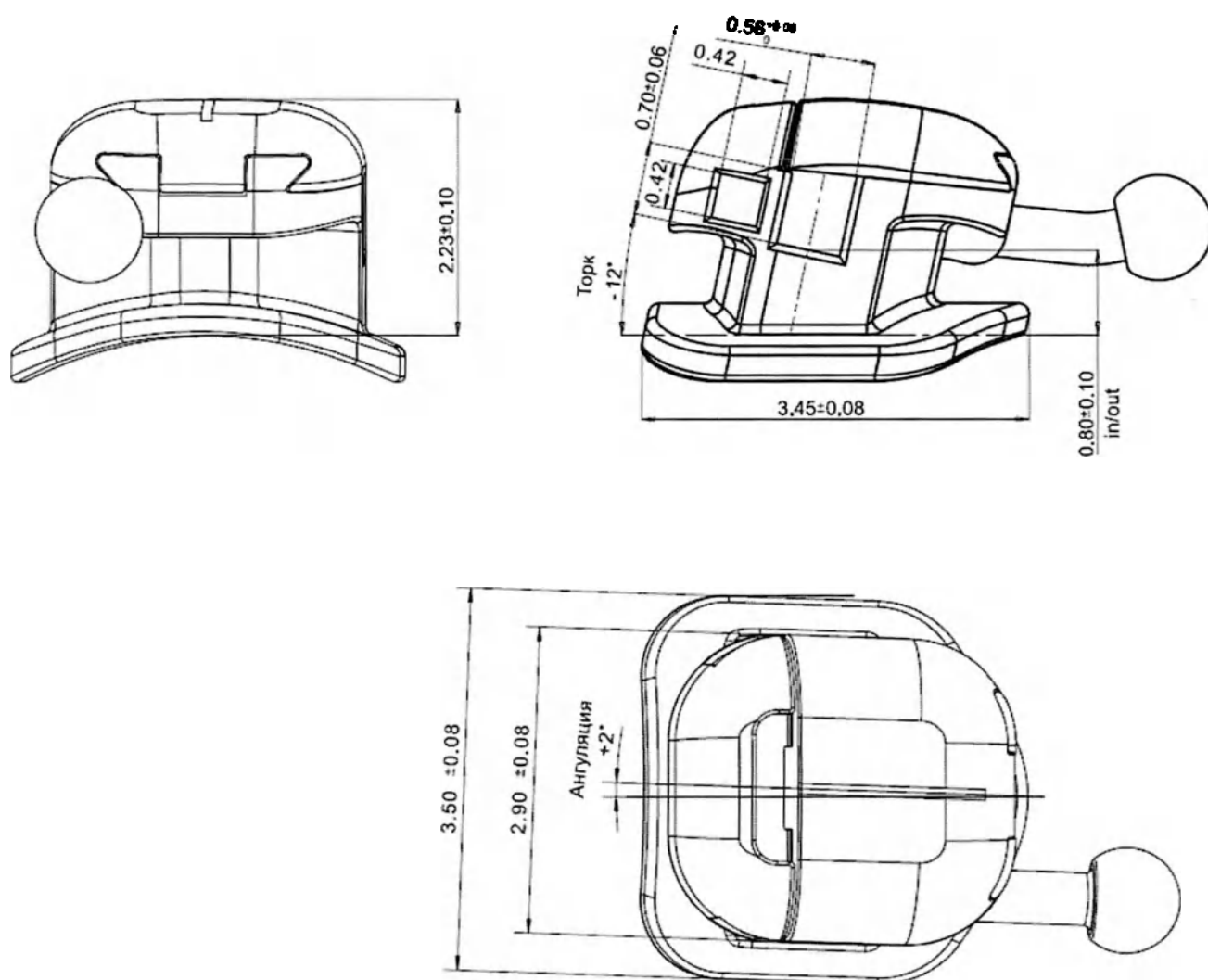


Рисунок 142. Брекеты металлические самолигирующие «NexStep Ultra» на 44 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-444(44)	-12	+2	0,095

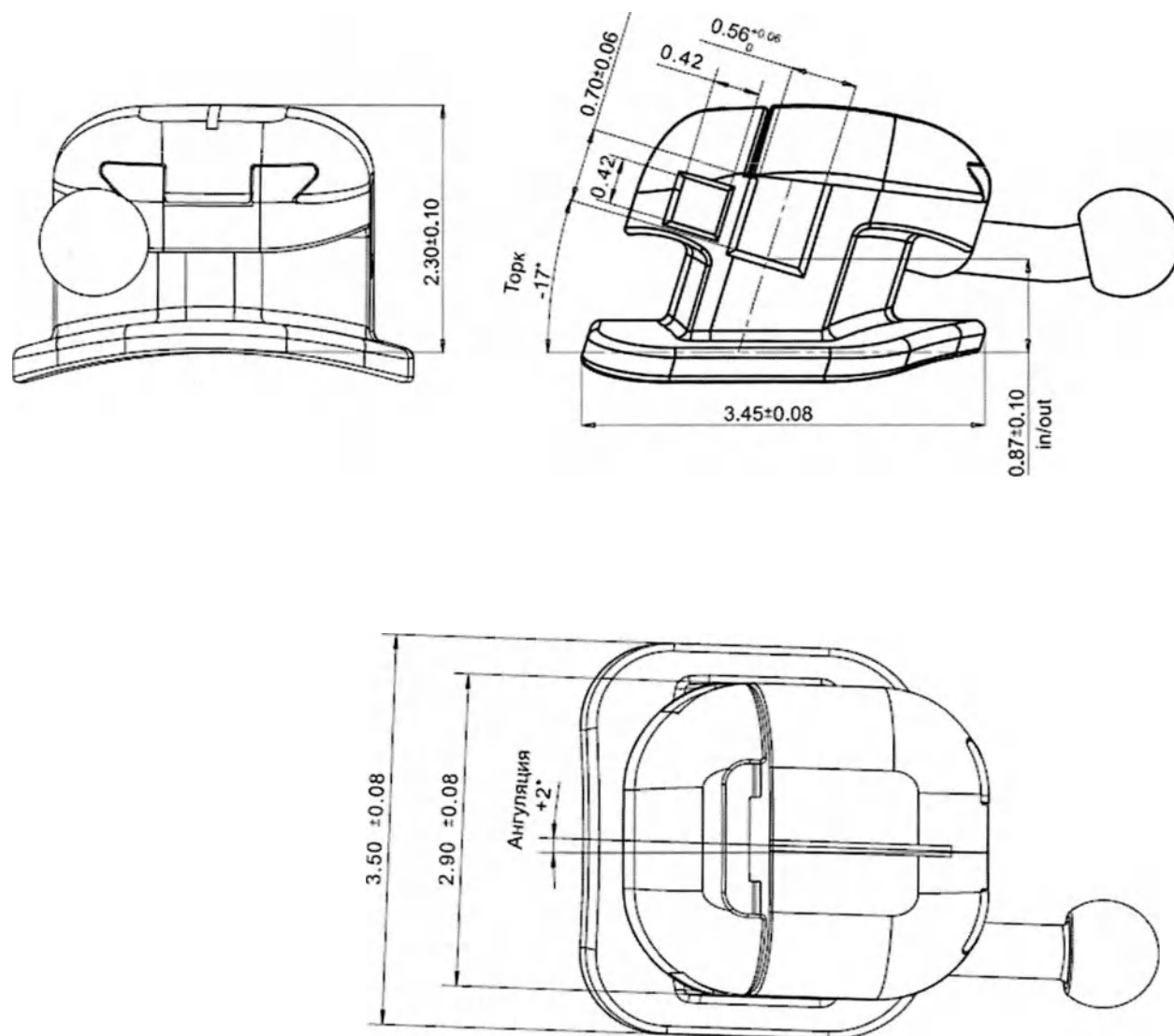


Рисунок 143. Брекет металлический самолигирующий «NexStep Ultra» на 45 зуб, с крючком, пропись MBT

Артикул	Торк, °	Ангуляция, °	Масса, г
31-454(45)	-17	+2	0,095

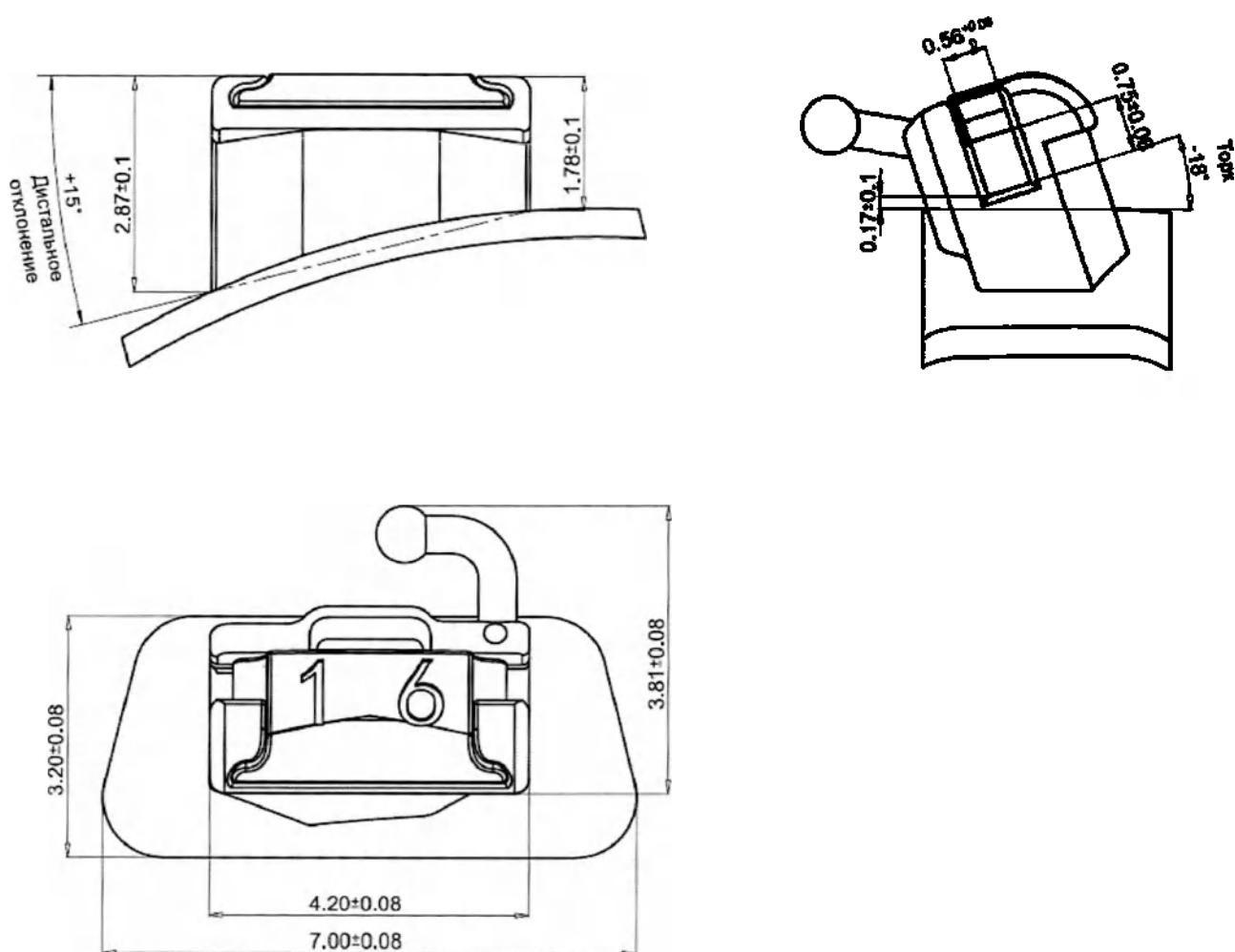


Рисунок 144. Щечная трубка металлическая самолигирующая на 16 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
41-160(16)	-18	+15	0,090

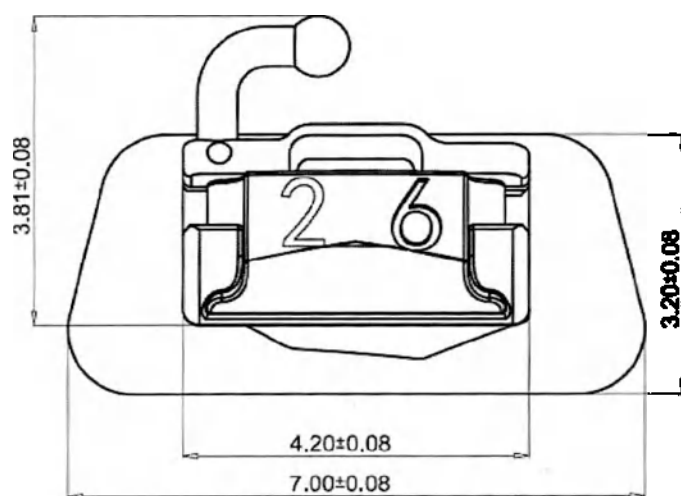
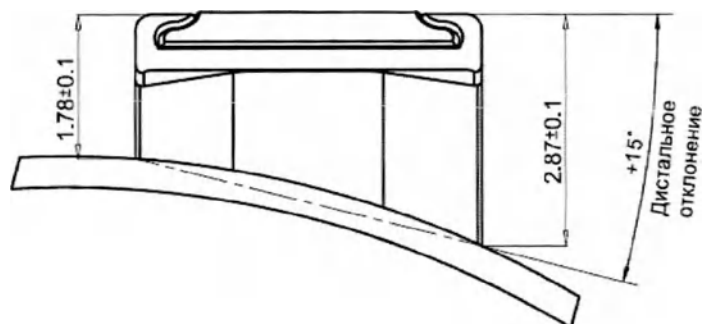
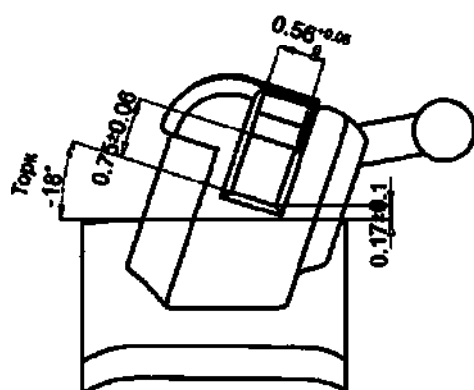


Рисунок 145. Щечная трубка металлическая самолигирующая на 26 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
41-260(26)	-18	+15	0,090

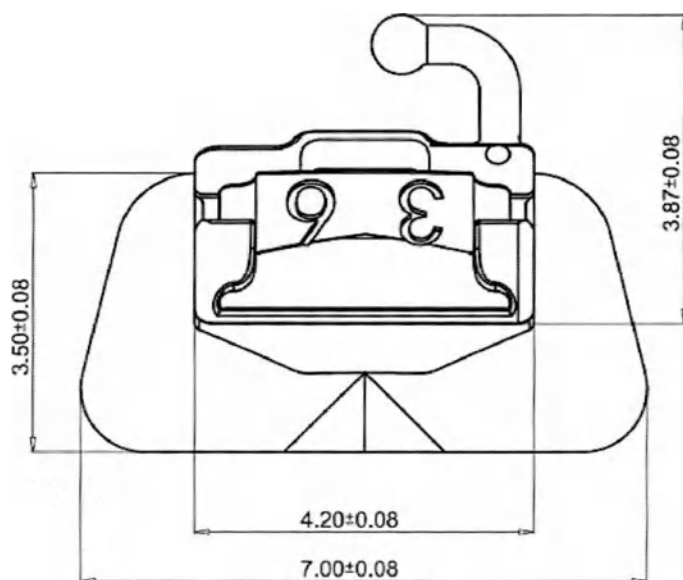
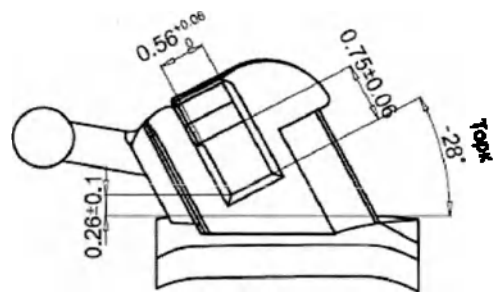
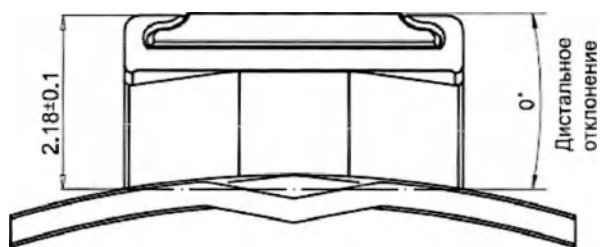


Рисунок 146. Щечная трубка металлическая самолигирующая на 36 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
41-360(36)	-28	0	0,090

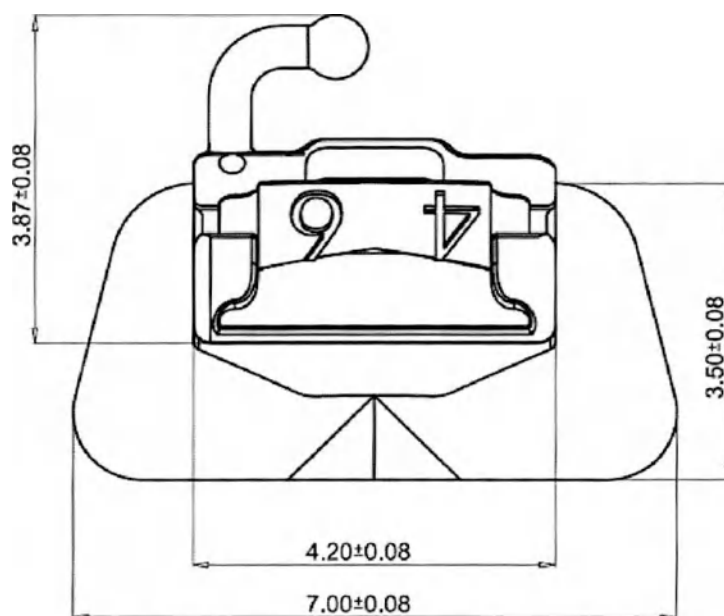
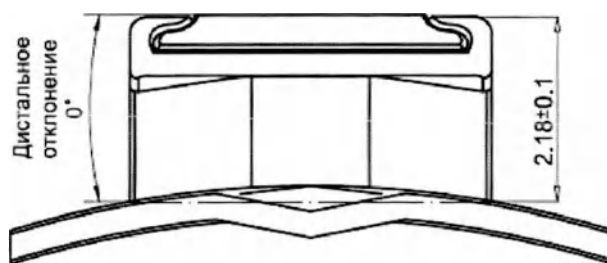
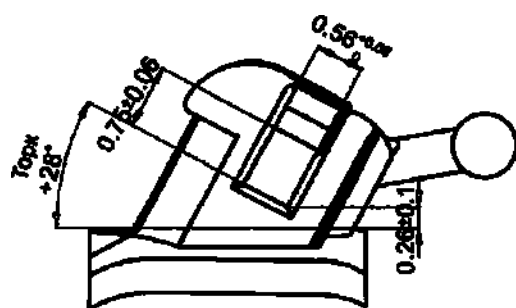


Рисунок 147. Щечная трубка металлическая самолигирующая на 46 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
41-460(46)	-28	0	0,090

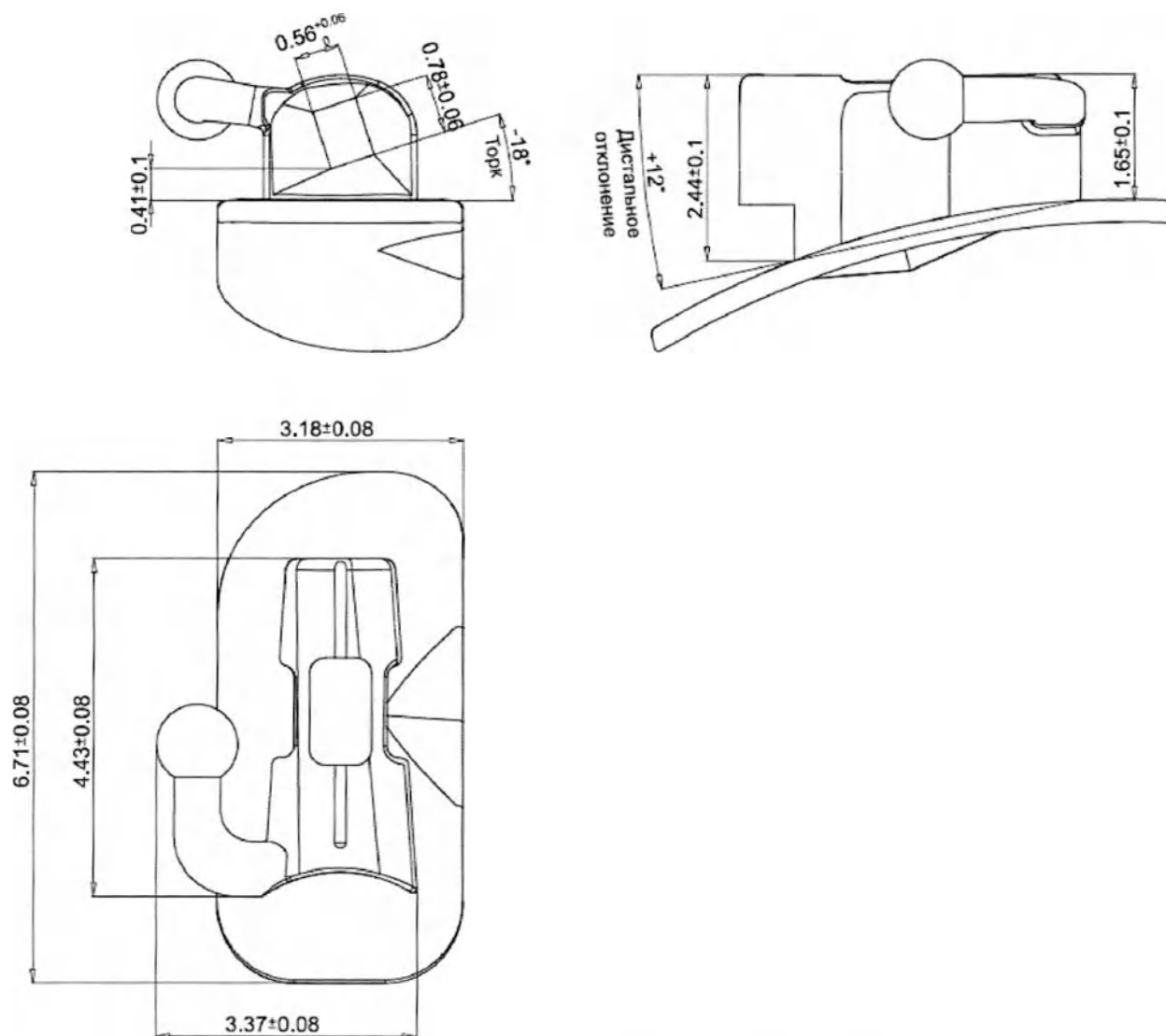


Рисунок 148. Щечная трубка металлическая на 16 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-160(16)	-18	+12	0,095

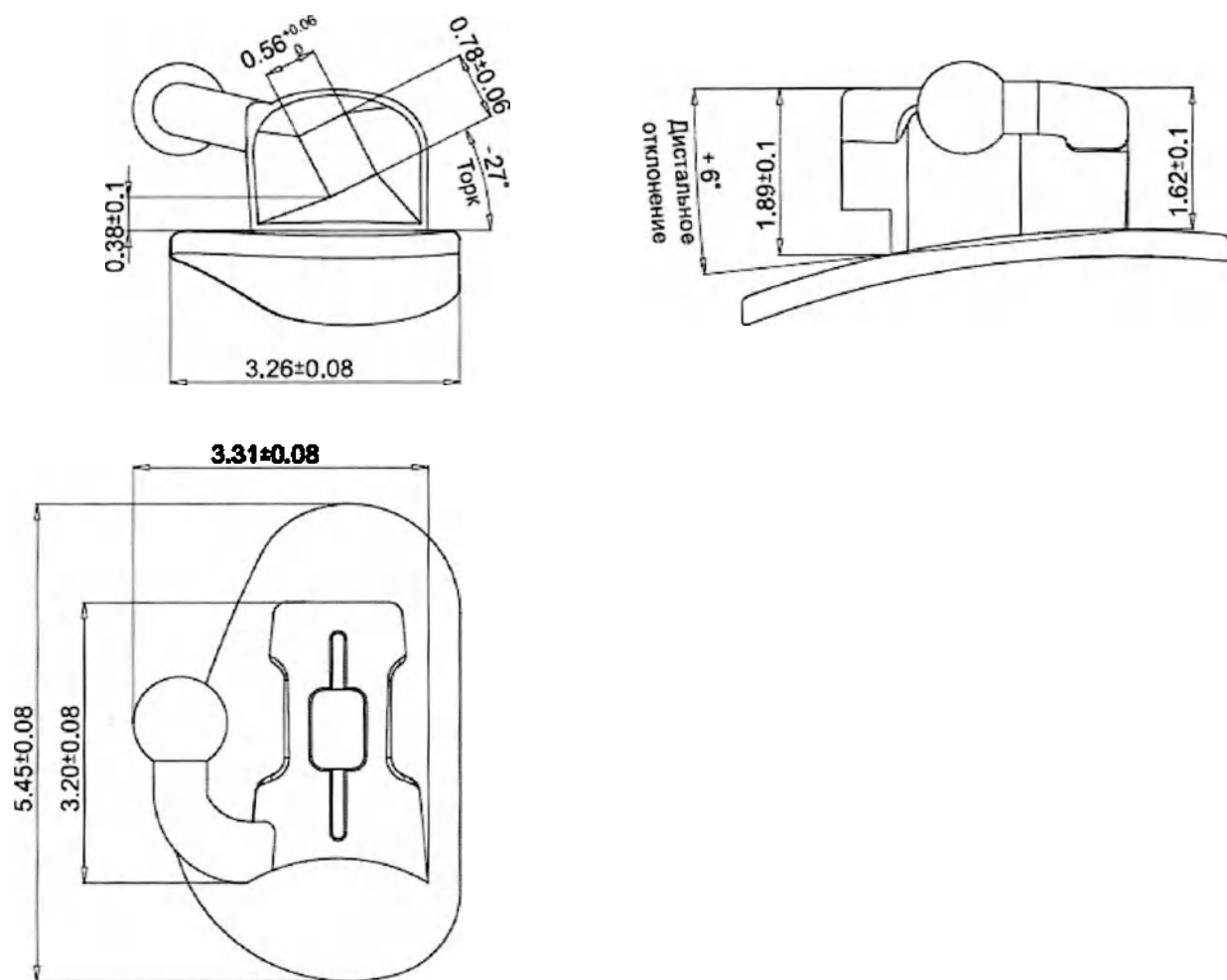


Рисунок 149. Щечная трубка металлическая на 17 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-170(17)	-27	+6	0,095

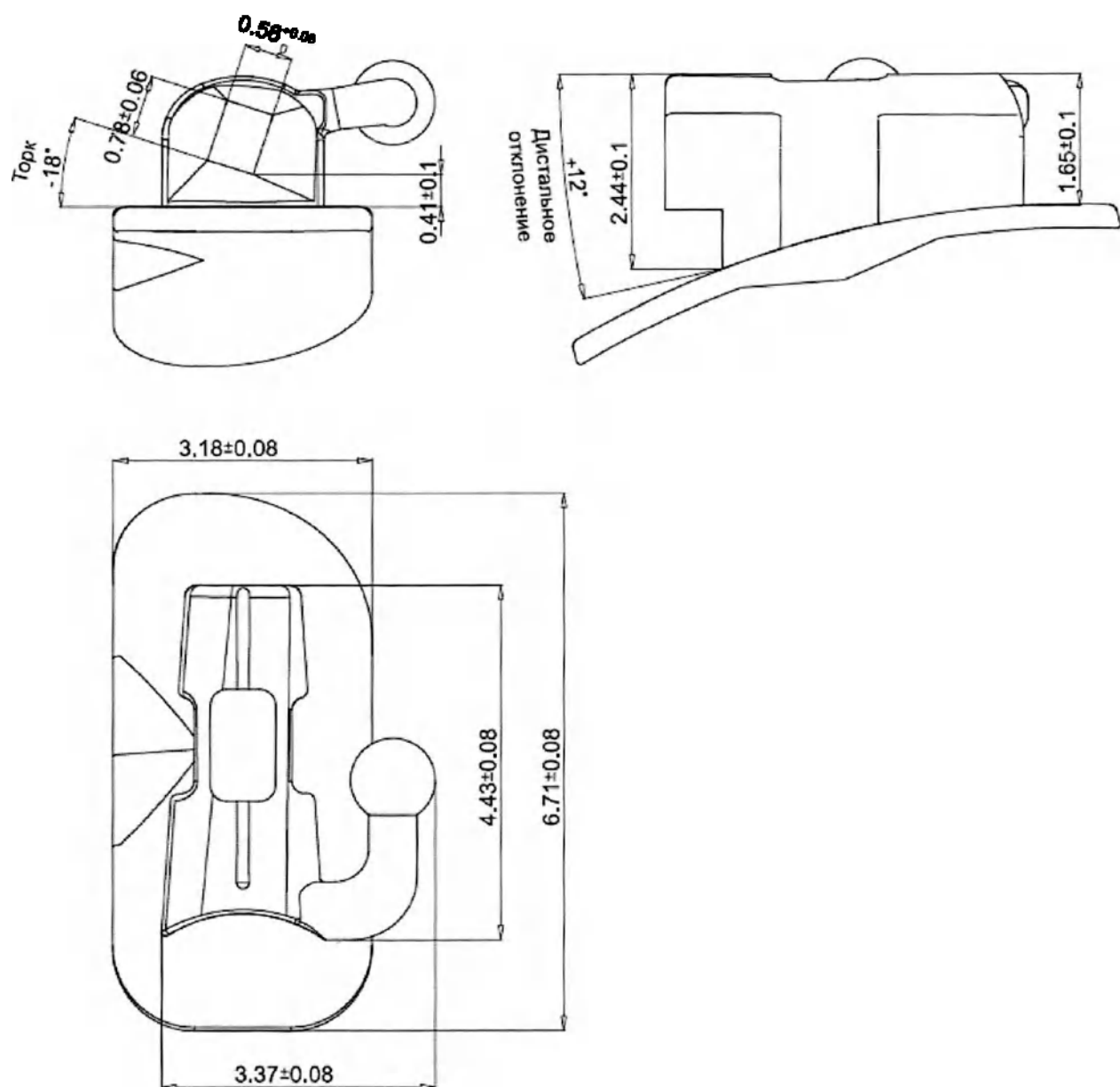


Рисунок 150. Щечная трубка металлическая на 26 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-260(26)	-18	+12	0,095

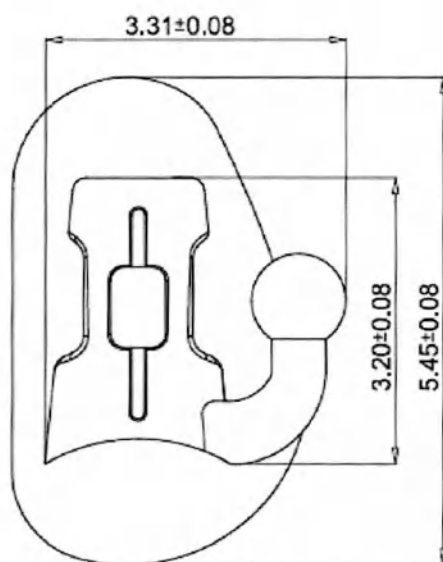
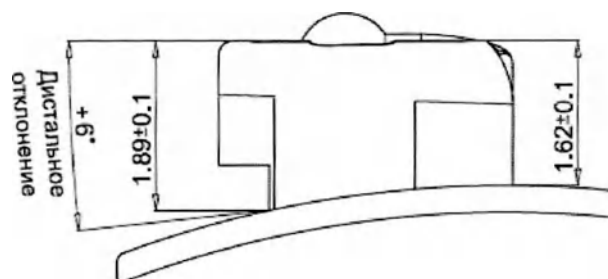
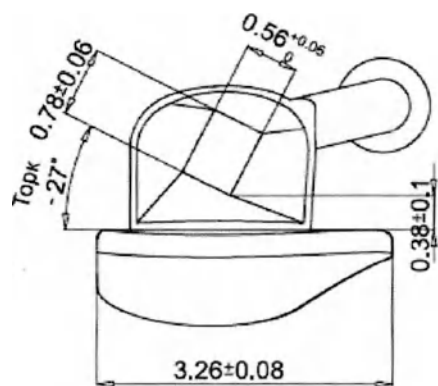


Рисунок 151. Щечная трубка металлическая на 27 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-270(27)	-18	+12	0,095

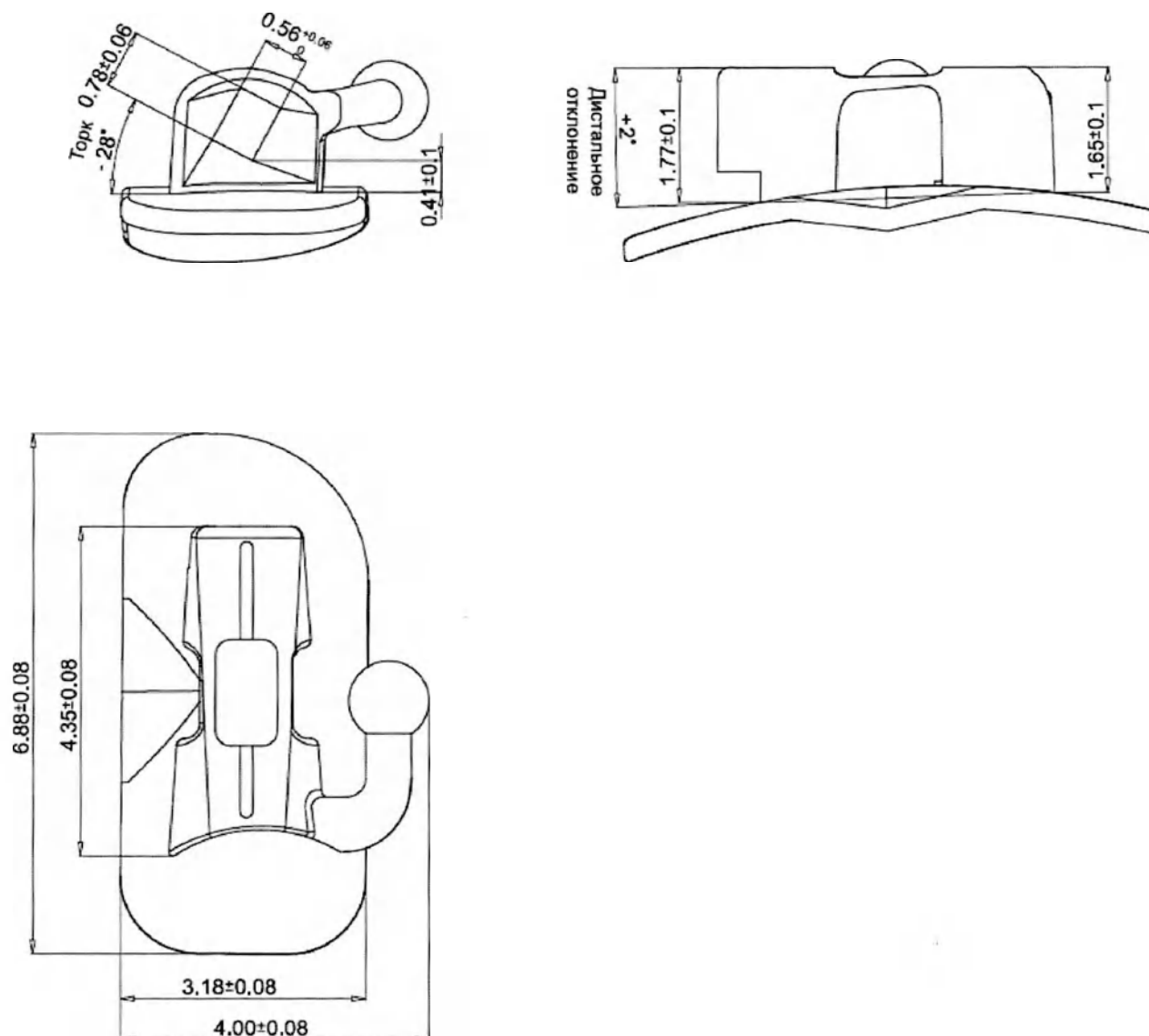


Рисунок 152. Щечная трубка металлическая на 36 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-360(36)	-28	+2	0,095

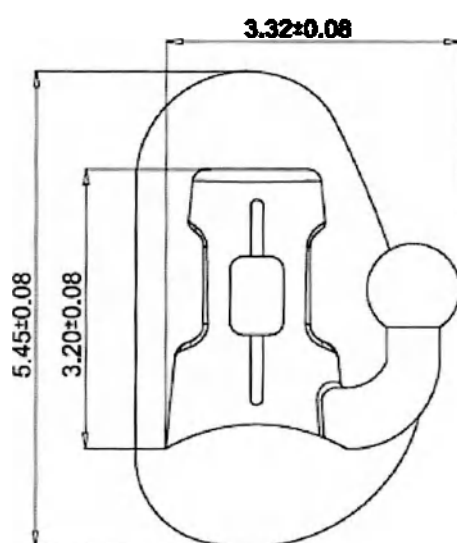
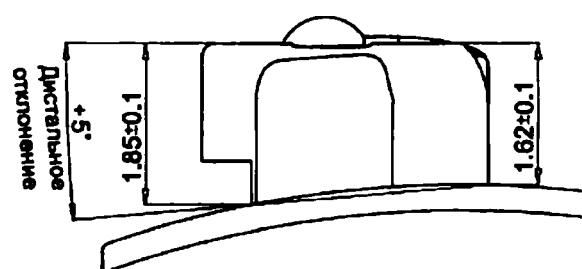
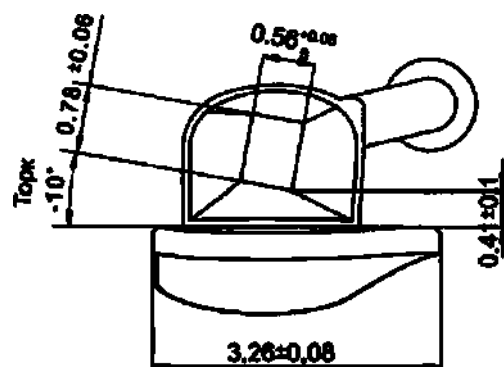


Рисунок 153. Щечная трубка металлическая на 37 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-370(37)	-10	+5	0,095

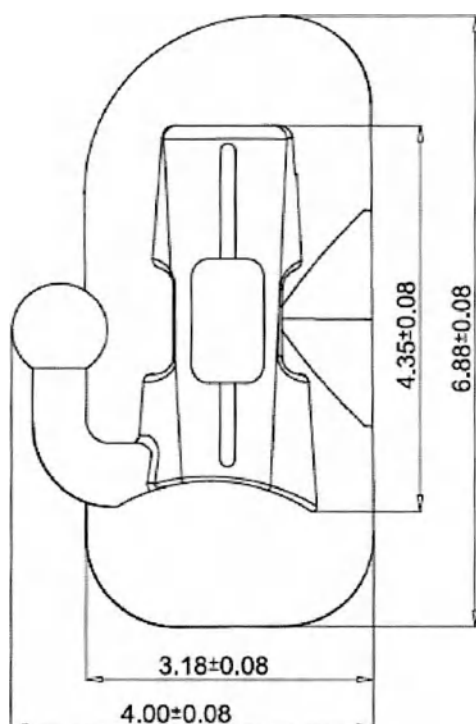
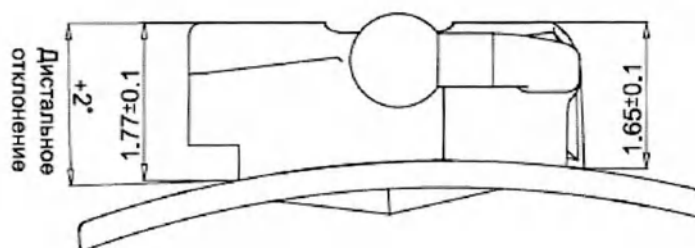
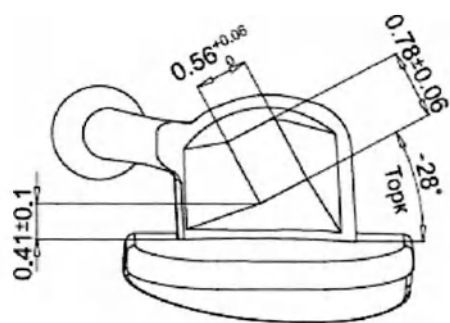


Рисунок 154. Щечная трубка металлическая на 46 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-460(46)	-28	+2	0,095

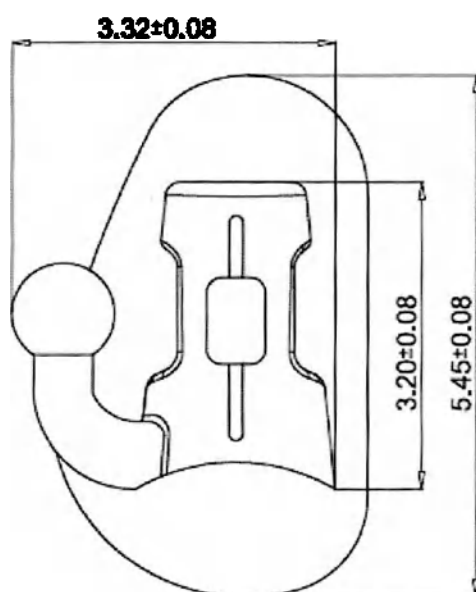
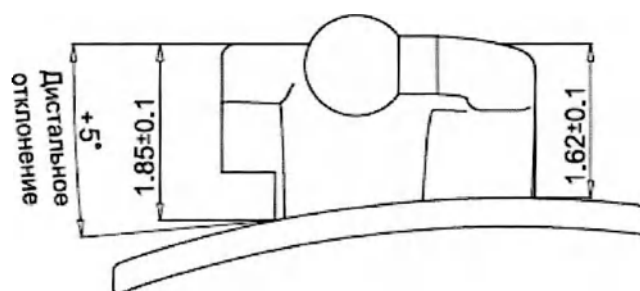
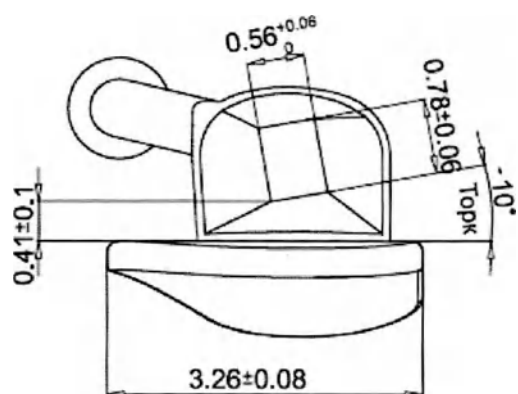


Рисунок 155. Щечная трубка металлическая на 47 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-470(47)	-10	+5	0,095

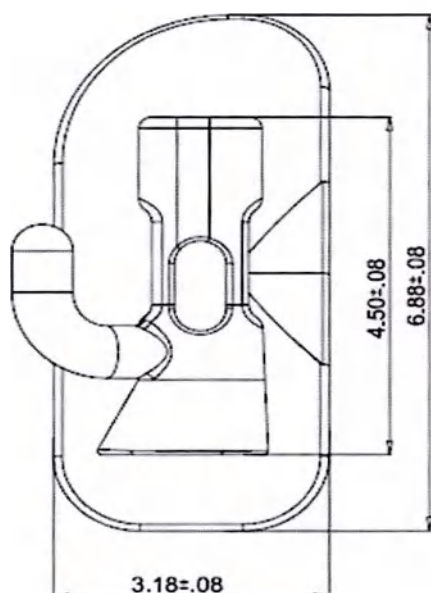
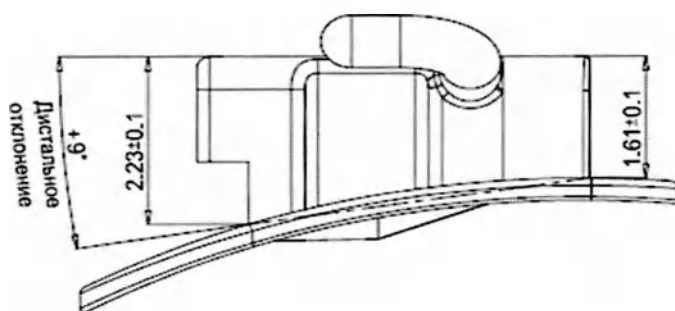
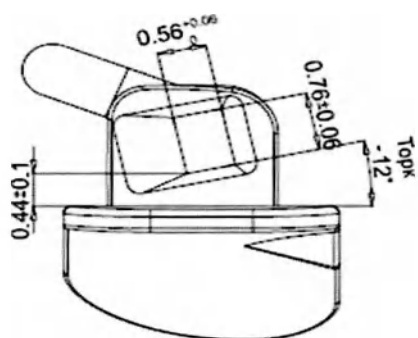


Рисунок 156. Щечная трубка металлическая на 16 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-166(16)	-12	+9	0,095

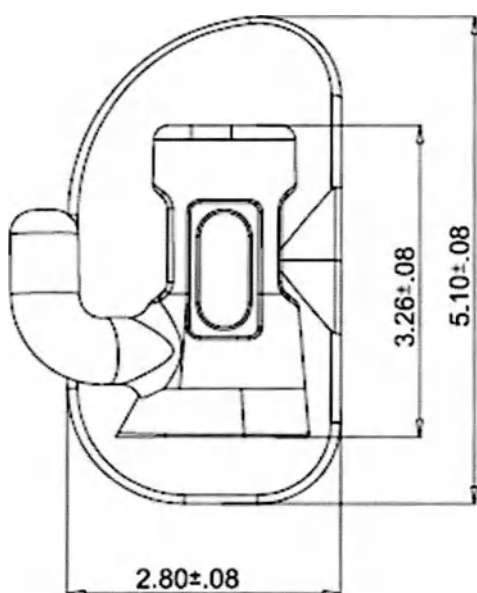
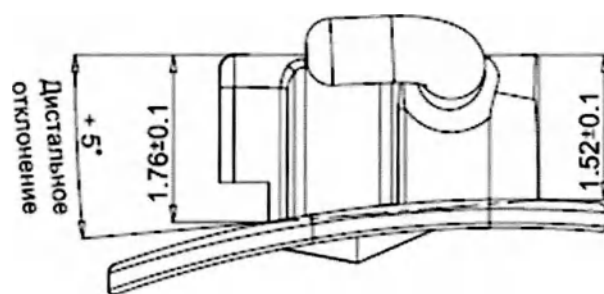
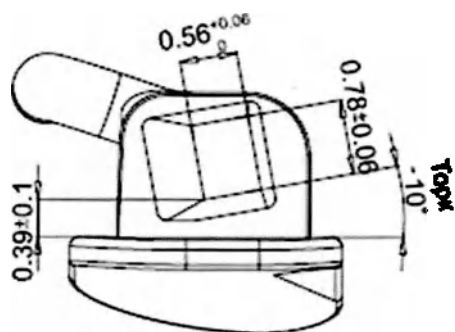


Рисунок 157. Щечная трубка металлическая на 17 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-176(17)	-10	+5	0,095

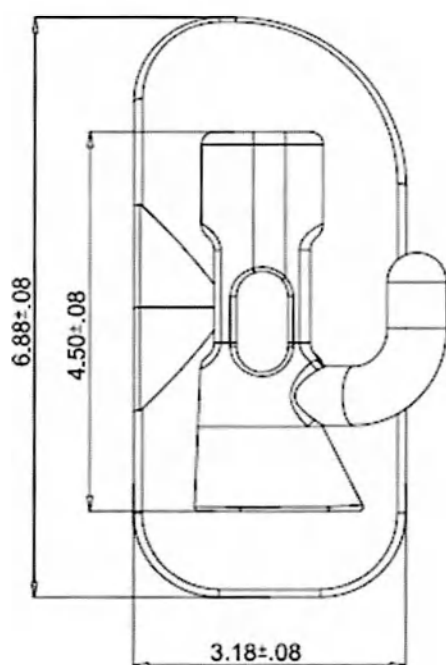
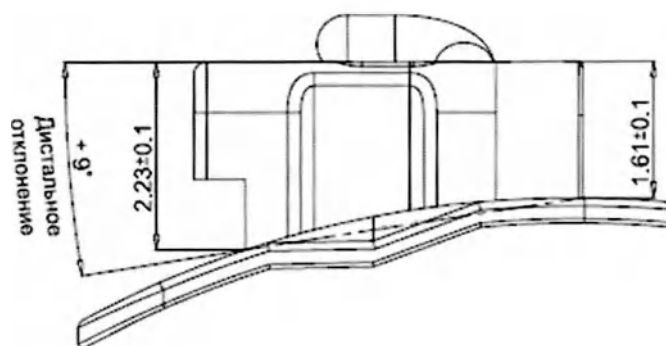
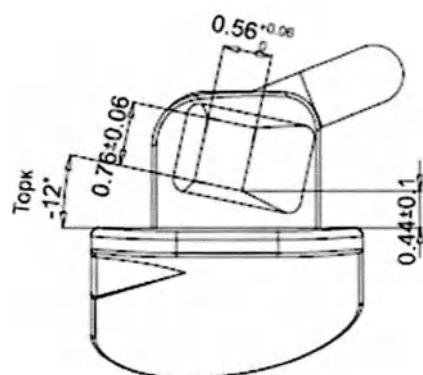


Рисунок 158. Щечная трубка металлическая на 26 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-266(26)	-12	+9	0,095

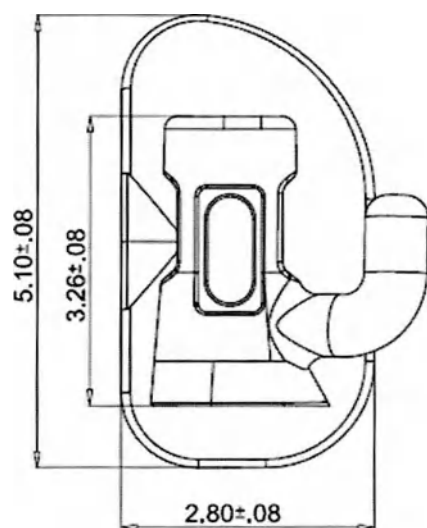
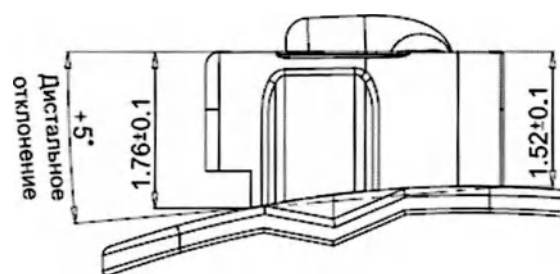
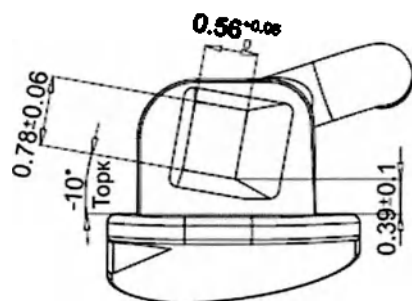


Рисунок 159. Щечная трубка металлическая на 27 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-276(27)	-10	+5	0,095

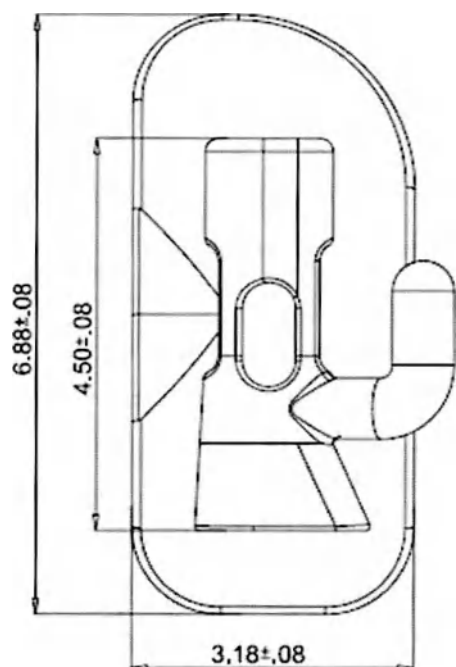
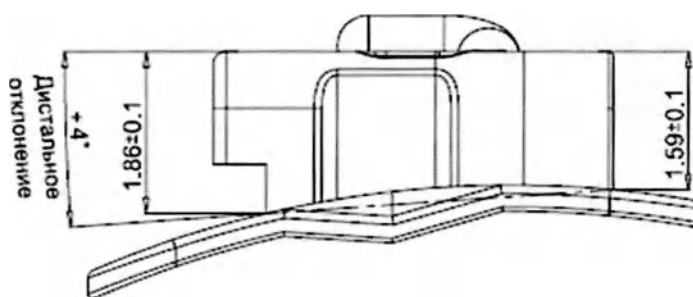
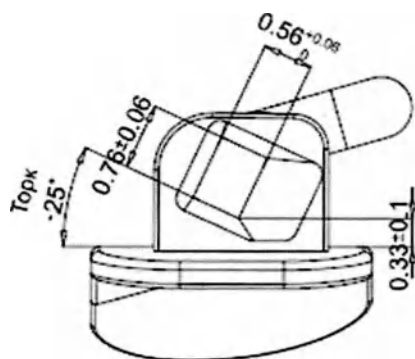


Рисунок 160. Щечная трубка металлическая на 36 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-366(36)	-25	+4	0,095

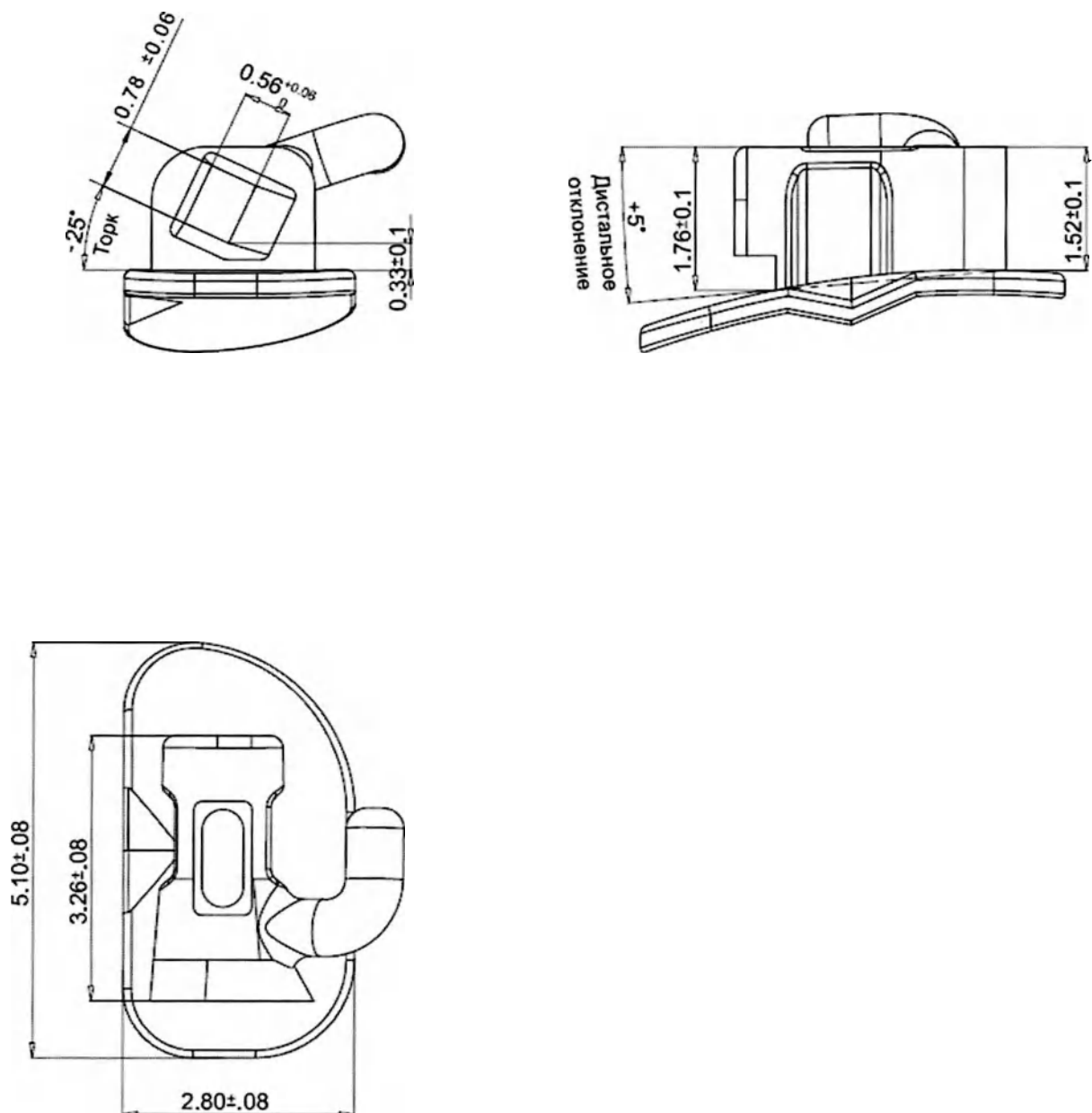


Рисунок 161. Щечная трубка металлическая на 37 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-376(37)	-25	+4	0,095

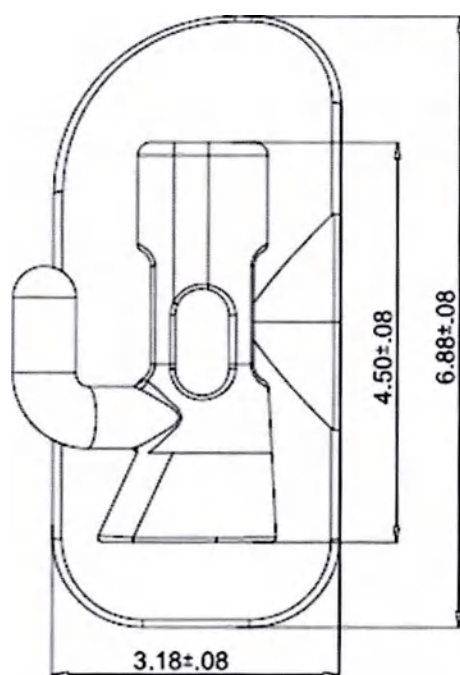
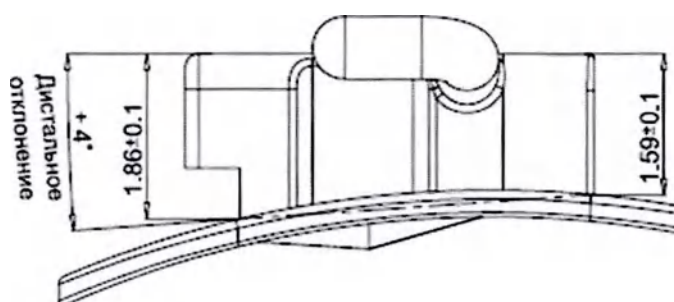
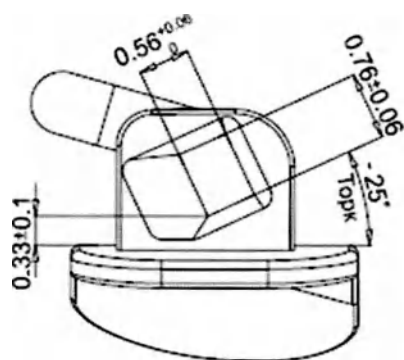


Рисунок 162. Щечная трубка металлическая на 46 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-466(46)	-25	+4	0,095

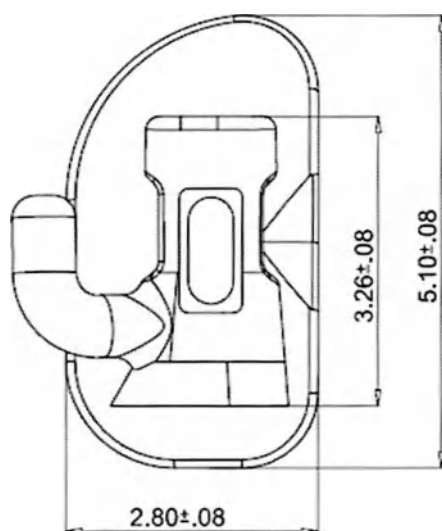
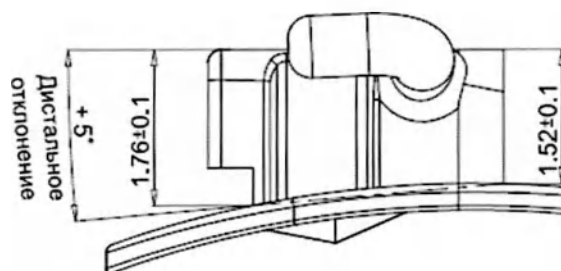
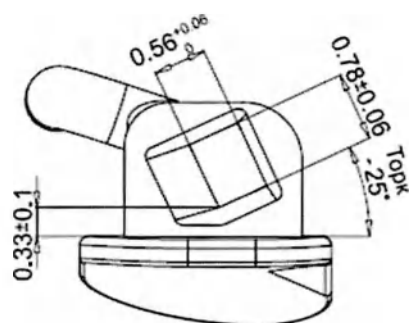


Рисунок 163. Щечная трубка металлическая на 47 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-476(47)	-25	+4	0,095

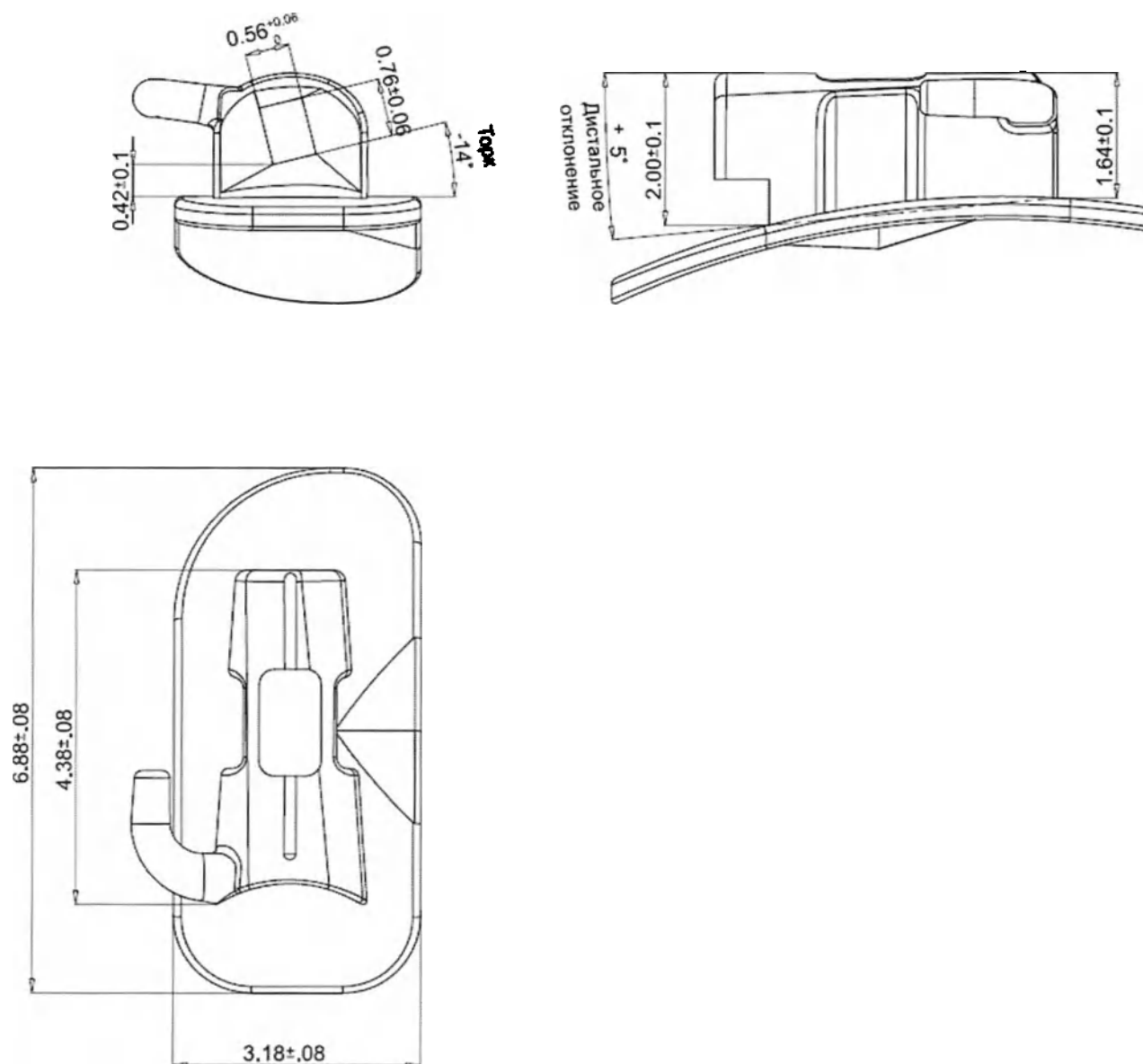


Рисунок 164. Щечная трубка металлическая на 16 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-164(16)	-14	+5	0,095

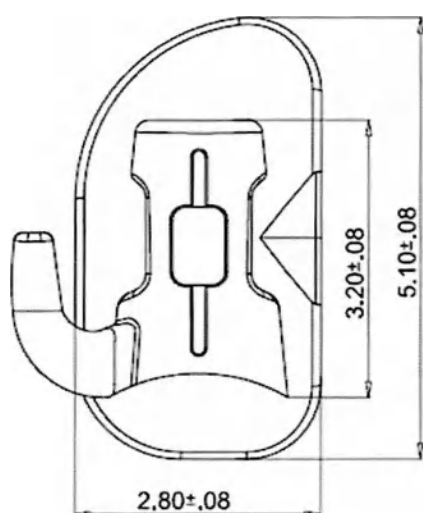
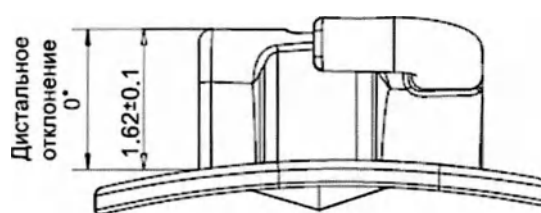
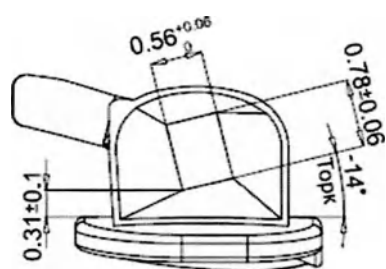


Рисунок 165. Щечная трубка металлическая на 17 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-174(17)	-14	0	0,095

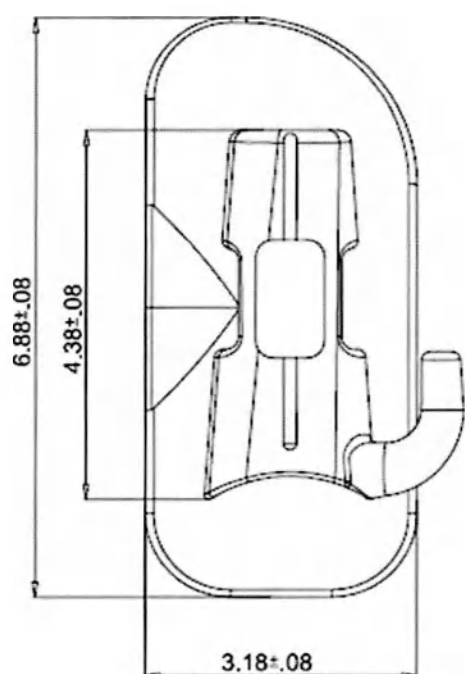
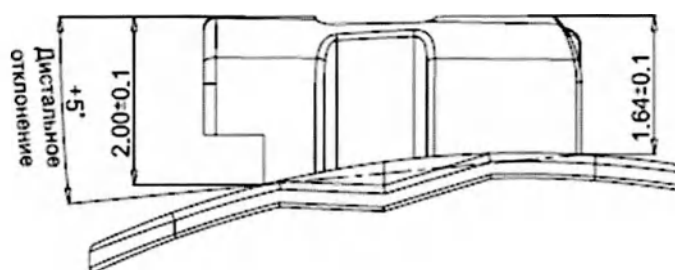
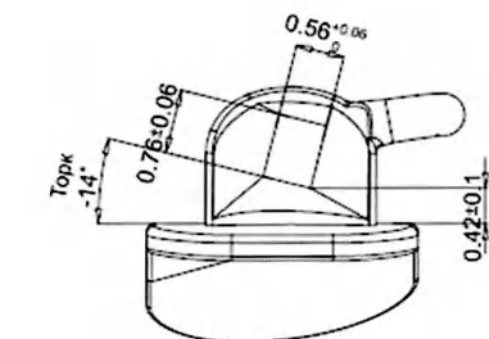


Рисунок 166. Щечная трубка металлическая на 26 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-264(26)	-14	+5	0,095

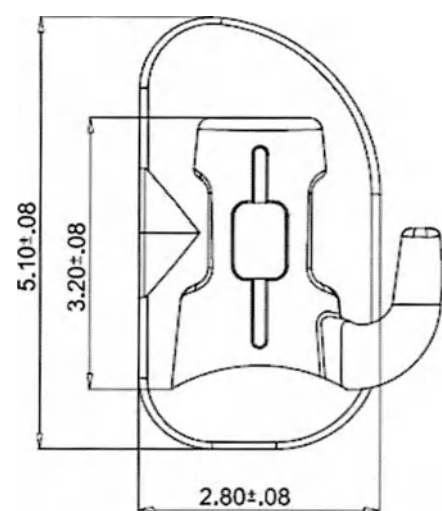
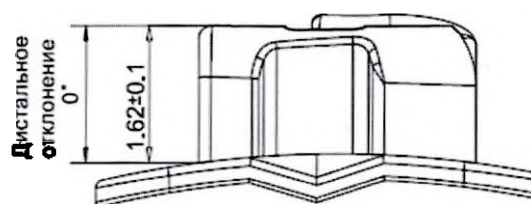
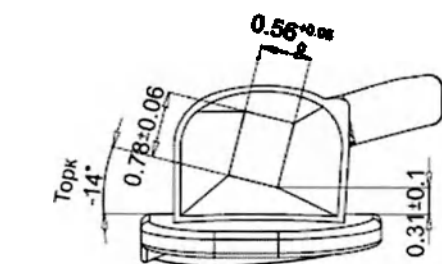


Рисунок 167. Щечная трубка металлическая на 27 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-274(27)	-14	0	0,095

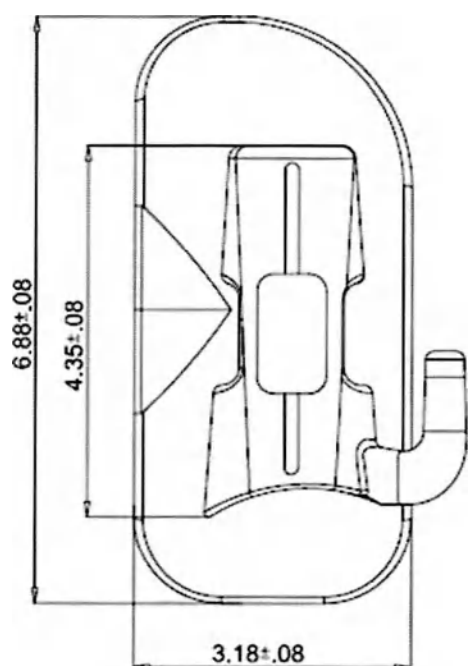
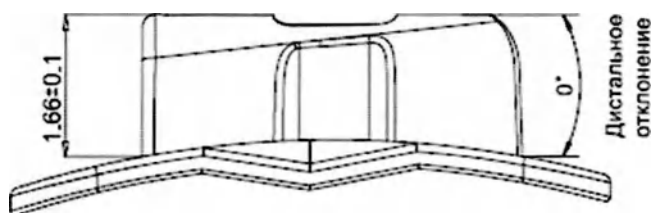
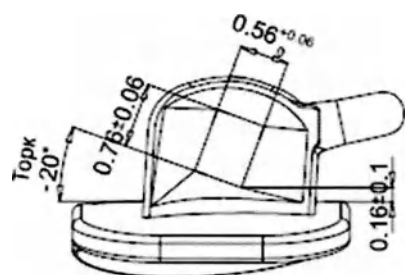


Рисунок 168. Щечная трубка металлическая на 36 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-364(36)	-20	0	0,095

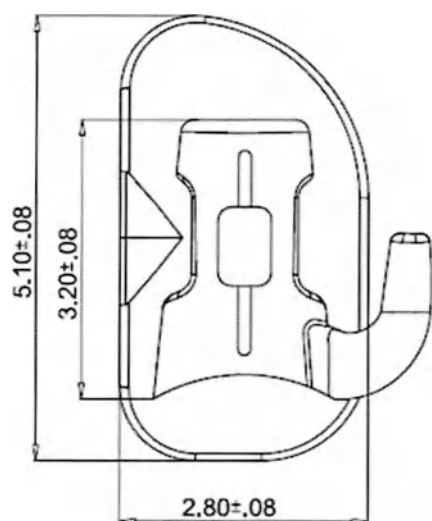
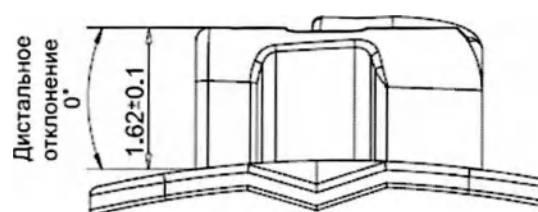
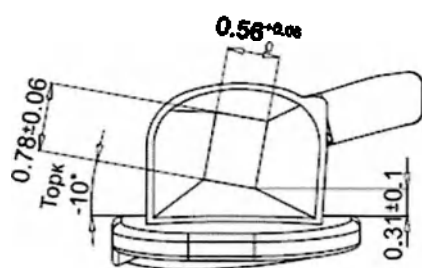


Рисунок 169. Щечная трубка металлическая на 37 зуб

Артикул	Торг, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-374(37)	-10	0	0,095

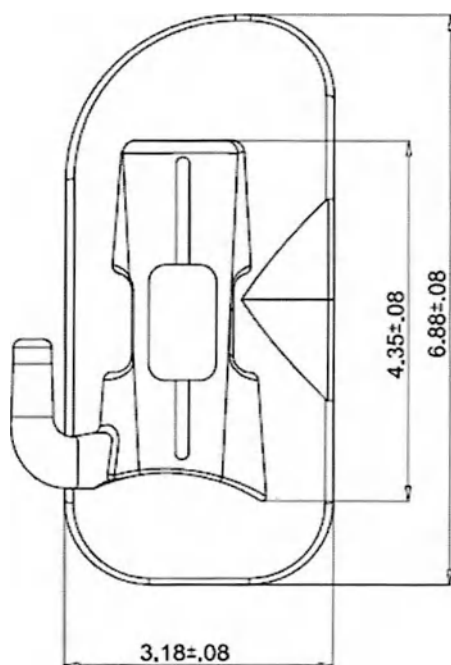
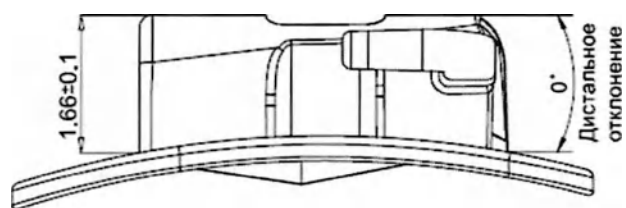
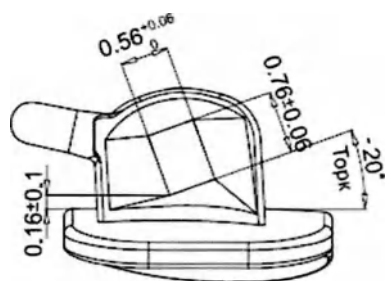


Рисунок 170. Щечная трубка металлическая на 46 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-464(46)	-20	0	0,095

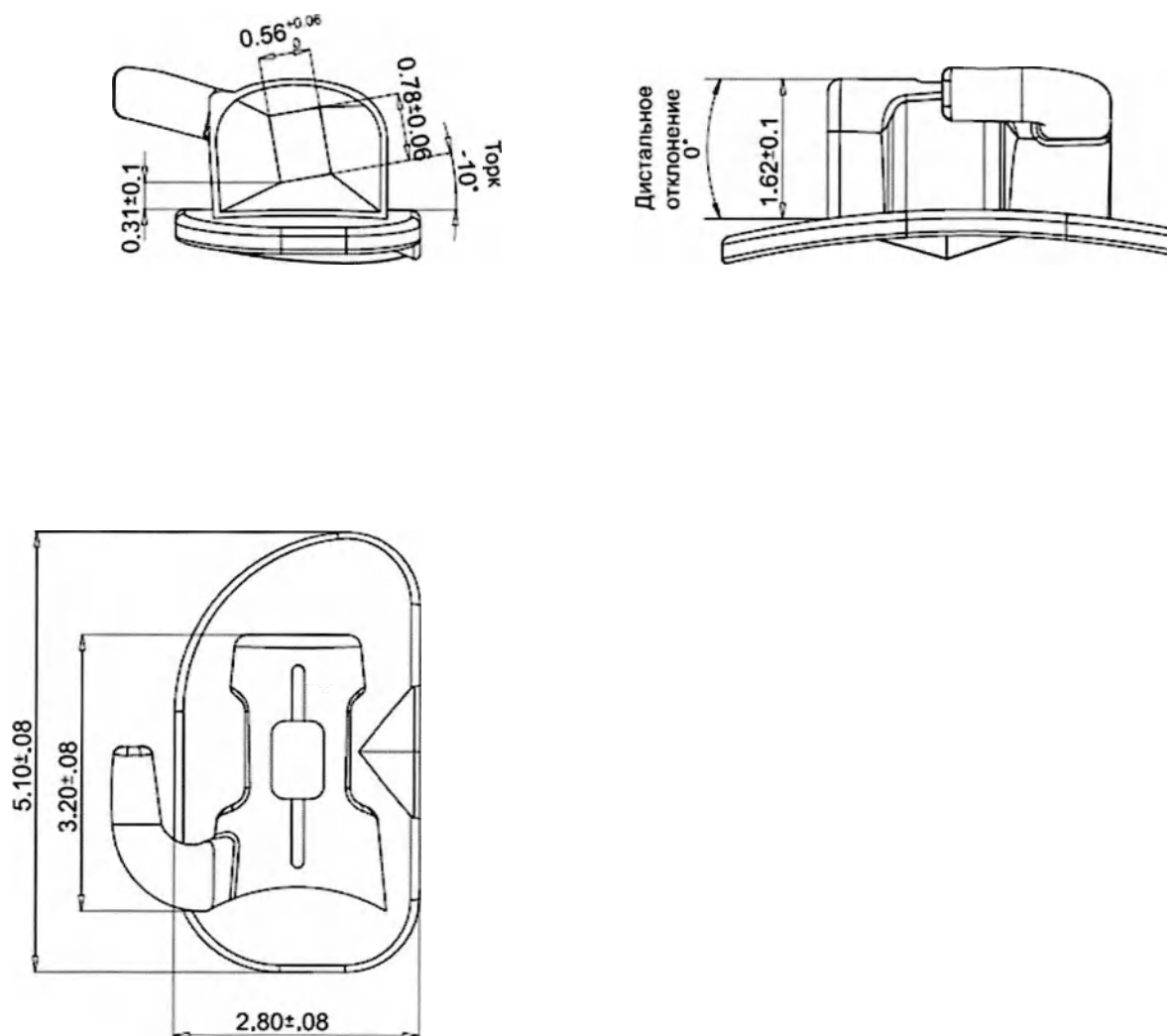


Рисунок 171. Щечная трубка металлическая на 47 зуб

Артикул	Торк, °	Дистальное отклонение, °	Масса, г
51-474(47)	-10	0	0,095

Наименование дуги	Условный размер	Габаритные размеры, мм $\pm 10\%$	Масса, г $\pm 10\%$
Ортодонтическая дуга ТМА	0,016 x 0,016"	0,41 x 0,41	0,131
Форма сечения - прямоугольная	0,016 x 0,022"	0,41 x 0,56	0,162
Формы дуг - Овальная,	0,017 x 0,022"	0,43 x 0,56	0,180
Натуральная	0,017 x 0,025"	0,43 x 0,64	0,204
Верхняя челюсть	0,018 x 0,025"	0,46 x 0,64	0,225
	0,019 x 0,025"	0,48 x 0,64	0,242
Ортодонтическая дуга ТМА	0,016 x 0,016"	0,41 x 0,41	0,131
Форма сечения - прямоугольная	0,016 x 0,022"	0,41 x 0,56	0,162
Формы дуг - Овальная,	0,017 x 0,022"	0,43 x 0,56	0,180
Натуральная	0,017 x 0,025"	0,43 x 0,64	0,204
Нижняя челюсть	0,018 x 0,025"	0,46 x 0,64	0,225
	0,019 x 0,025"	0,48 x 0,64	0,242
Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами	0,013"	0,33	0,104
	0,014"	0,36	0,127
Форма сечения - круглая	0,016"	0,41	0,158
Верхняя челюсть	0,018"	0,46	0,191
Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами	0,013"	0,33	0,104
	0,014"	0,36	0,127
Форма сечения - круглая	0,016"	0,41	0,158
Нижняя челюсть	0,018"	0,46	0,191
Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами	0,014 x 0,025"	0,36 x 0,64	0,204
	0,016 x 0,025"	0,41 x 0,64	0,245
Форма сечения - прямоугольная	0,018 x 0,025"	0,46 x 0,64	0,295
Верхняя челюсть			
Ортодонтическая дуга CU-NITI со стопами	0,014 x 0,025"	0,36 x 0,64	0,204
	0,016 x 0,025"	0,41 x 0,64	0,245
Форма сечения - прямоугольная	0,018 x 0,025"	0,46 x 0,64	0,295
Нижняя челюсть			
Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI	0,012"	0,30	0,070
	0,014"	0,36	0,108
Форма сечения - круглая	0,016"	0,41	0,144
Формы дуг - Овальная,	0,018"	0,46	0,179
Натуральная			
Верхняя челюсть			
Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI	0,012"	0,30	0,070
	0,014"	0,36	0,108
Форма сечения - круглая	0,016"	0,41	0,144
Формы дуг - Овальная,	0,018"	0,46	0,179
Натуральная			
Нижняя челюсть			
Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI	0,014x0,025"	0,36 x 0,64	0,153
	0,016x0,016"	0,41 x 0,41	0,168
Форма сечения - прямоугольная	0,016x0,022"	0,41 x 0,56	0,180
Формы дуг - Овальная,	0,016x0,025"	0,41 x 0,64	0,192
Натуральная	0,017x0,022"	0,43 x 0,56	0,204
Верхняя челюсть	0,017x0,025"	0,43 x 0,64	0,222
	0,018x0,018"	0,46x 0,46	0,239
	0,018x0,022"	0,46 x 0,56	0,253
	0,018x0,025"	0,46 x 0,64	0,265
	0,019x0,025"	0,48 x 0,64	0,277
Ортодонтическая дуга - Super Elastic NITI	0,014x0,025"	0,36 x 0,64	0,153
	0,016x0,016"	0,41 x 0,41	0,168

Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,180
Формы дуг - Овальная,	0.016x0.025"	0,41 x 0,64	0,192
Натуральная	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,204
Нижняя челюсть	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,222
	0.018x0.018"	0,46x 0,46	0,239
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,253
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,265
	0.019x0.025"	0,48 x 0,64	0,277
Ортодонтическая дуга -	0.014"	0,36	0,108
Нержавеющая сталь	0.016"	0,41	0,144
Форма сечения - круглая	0.018"	0,46	0,179
Формы дуг - Овальная,	0.020"		
Натуральная			
Верхняя челюсть			
Ортодонтическая дуга -	0.014"	0,36	0,108
Нержавеющая сталь	0.016"	0,41	0,144
Форма сечения - круглая	0.018"	0,46	0,179
Формы дуг - Овальная,	0.020"	0,51	0,201
Натуральная			
Нижняя челюсть			
Ортодонтическая дуга -	0.014x0.025"	0,36 x 0,64	0,276
Нержавеющая сталь	0.016x0.016"	0,41 x 0,41	0,223
Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,234
Формы дуг - Овальная,	0.016x0.025"	0,41 x 0,64	0,247
Натуральная	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,253
Верхняя челюсть	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,269
	0.018x0.018"	0,46 x 0,46	0,241
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,258
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,275
	0.019x0.025"	0,48 x 0,64	0,282
	0.020x0.020"	0,51 x 0,51	0,332
	0.021x0.025"	0,53 x 0,64	0,396
Ортодонтическая дуга -	0.014x0.025"	0,36 x 0,64	0,276
Нержавеющая сталь	0.016x0.016"	0,41 x 0,41	0,223
Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,234
Формы дуг - Овальная,	0.016x0.025"	0,41 x 0,64	0,247
Натуральная	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,253
Нижняя челюсть	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,269
	0.018x0.018"	0,46 x 0,46	0,241
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,258
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,275
	0.019x0.025"	0,48 x 0,64	0,292
	0.020x0.020"	0,51 x 0,51	0,332
	0.021x0.025"	0,53 x 0,64	0,396
Ортодонтическая дуга - Thermal	0.012"	0,30	0,082
Active	0.014"	0,36	0,106
Форма сечения - круглая	0.016"	0,41	0,142
Формы дуг - Овальная,	0.018"	0,46	0,168
Натуральная			
Верхняя челюсть			
Ортодонтическая дуга - Thermal	0.012"	0,30	0,082
Active	0.014"	0,36	0,106
Форма сечения - круглая	0.016"	0,41	0,142
	0.018"	0,46	0,168

Формы дуг - Овальная, Натуральная Нижняя челюсть			
Ортодонтическая дуга - Thermal Active	0.014x0.025"	0,36 x 0,64	0,276
Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.016"	0,41 x 0,41	0,223
Формы дуг - Овальная, Натуральная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,234
Верхняя челюсть	0.016x0.025"	0,41 x 0,64	0,247
	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,253
	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,269
	0.018x0.018"	0,46 x 0,46	0,241
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,258
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,275
	0.019x0.025"	0,48 x 0,64	0,307
Ортодонтическая дуга - Thermal Active	0.014x0.025"	0,36 x 0,64	0,276
Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.016"	0,41 x 0,41	0,223
Формы дуг - Овальная, Натуральная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,234
Нижняя челюсть	0.016x0.025"	0,41 x 0,64	0,247
	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,253
	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,269
	0.018x0.018"	0,46 x 0,46	0,241
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,258
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,275
	0.019x0.025"	0,48 x 0,64	0,307
Ортодонтическая дуга - Reverse Curve	0.014"	0,36	0,101
Форма сечения - круглая	0.016"	0,41	0,138
Верхняя челюсть	0.018"	0,46	0,170
Ортодонтическая дуга - Reverse Curve	0.014"	0,36	0,101
Форма сечения - круглая	0.016"	0,41	0,138
Нижняя челюсть	0.018"	0,46	0,170
Ортодонтическая дуга - Reverse Curve	0.016x0.016"	0,41 x 0,41	0,223
Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,234
Верхняя челюсть	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,247
	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,253
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,269
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,284
Ортодонтическая дуга - Reverse Curve	0.016x0.016"	0,41 x 0,41	0,223
Форма сечения - прямоугольная	0.016x0.022"	0,41 x 0,56	0,234
Нижняя челюсть	0.017x0.022"	0,43 x 0,56	0,247
	0.017x0.025"	0,43 x 0,64	0,253
	0.018x0.022"	0,46 x 0,56	0,269
	0.018x0.025"	0,46 x 0,64	0,284

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 192 листов

Генеральный директор ООО
«ИМПЛАНТ ИНЖИНИРИНГ»

 / Соколов А.В. /
(подпись)

