

Фотографические изображения медицинского изделия

Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022

Варианты исполнения:


- 1. Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип А - лента жгута без наконечника;**
- 2. Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником;**
- 3. Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип А - лента жгута без наконечника;**
- 4. Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником.**

Комплект поставки:

- Жгут одного исполнения - 1 шт.**
- Руководство по эксплуатации- 1 шт.**



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)

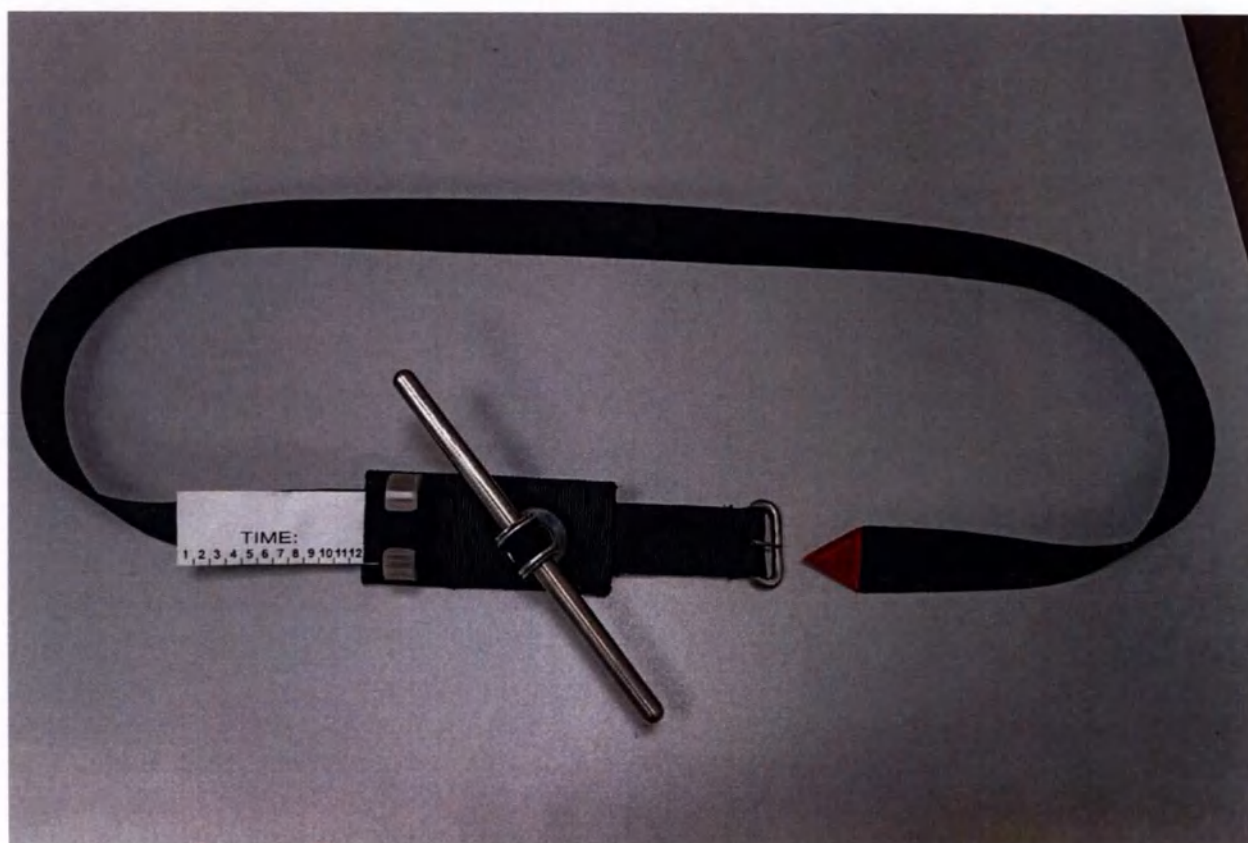

Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в потребительской упаковке (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)

Лицо

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2


ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
кровоостанавливающий
с дозированной компрессией
«ФЭСТ»**

ТУ 32.50.13-248-10973749-2022

Вариант исполнения:

Жгут кровоостанавливающий – 1 (ширина 25 мм),
тип А - лента жгута без наконечника
ПУ №

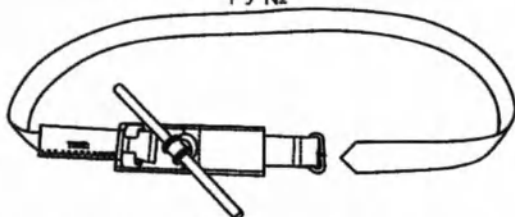

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 01.2022
Партия № 001

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Артикул:

Оборот

Руководство по эксплуатации

«Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи, для предотвращения кровопотери.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспаление тканей или нагноительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (может привести к распространению инфекции и летальному исходу);
- открытый перелом конечности или открытая рана в области наложения жгута (может вызвать ещё большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- резко выраженный атеросклероз (ведёт к переполнению вен и при наличии в них тромбов – к тромбозам);
- наличие анаэробных инфекций.

Примечание: оценив риск угрозы жизни пострадавшего, врач может принять решение о наложении жгута, не смотря на вышеперечисленные противопоказания.

Порядок работы.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Обернуть жгут вокруг конечности выше места кровотечения. Продеть конец ленты жгута через пряжку. Затянуть ленту и зафиксировать ее с помощью шпелёка пряжки.

Вращательными движениями турникета затянуть петлю до прекращения кровотечения или до прекращения прощупывания пульса. Турникет зафиксировать с помощью фиксатора.

На ярлыке жгута сделать отметку о времени наложения жгута.

При повторном использовании, если отметку о предыдущем наложении жгута не удалось удалить в процессе дезинфекции, ярлык следует отрезать, а к жгуту прикрепить бирку с указанием времени наложения.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
2. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
3. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Дезинфекция.

Дезинфекцию жгута производят путем двух кратного протирания щеткой, салфеткой из бязи или марли, смоченной 1 - 3 % раствором хлорамина с интервалом между протираниями не менее 30 мин.



Макет маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в потребительской упаковке (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)

Лицо

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2


ФЭСТ®

Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ»

ТУ 32.50.13-248-10973749-2022

Вариант исполнения:

Жгут кровоостанавливающий – 1 (ширина 25 мм),
тип Б - лента жгута с наконечником
РУ №

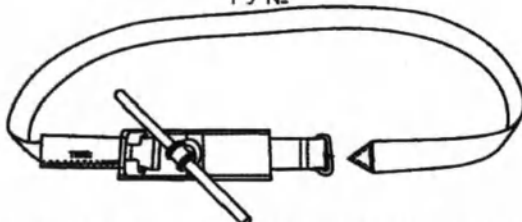

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 01.2022
Партия № 001

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Артикул:

Оборот

Руководство по эксплуатации

«Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи, для предотвращения кровотечения.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспаление тканей или нагноительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (может привести к распространению инфекции и летальному исходу);
- открытый перелом конечности или открытая рана в области наложения жгута (может вызвать ещё большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- резко выраженный атеросклероз (ведёт к переполнению вен и при наличии в них тромбов – к тромбозам);
- наличие анаэробных инфекций.

Примечание: оценив риск угрозы жизни пострадавшего, врач может принять решение о наложении жгута, не смотря на вышеперечисленные противопоказания.

Порядок работы.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Обернуть жгут вокруг конечности выше места кровотечения.

Продеть конец ленты жгута через пряжку. Затянуть ленту и зафиксировать ее с помощью шпелки-пряжки.

Вращательными движениями турникета затянуть петлю до прекращения кровотечения или до прекращения прощупывания пульса. Турникет зафиксировать с помощью фиксатора.

На ярлыке жгута сделать отметку о времени наложения жгута.

При повторном использовании, если отметку о предыдущем наложении жгута не удалось удалить в процессе дезинфекции, ярлык следует отрезать, а к жгуту прикрепить бирку с указанием времени наложения.


Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
2. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
3. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Дезинфекция.

Дезинфекцию жгута производят путем двух кратного протирания щеткой, салфеткой из бязи или марли, смоченной 1 - 3 % раствором хлорамина с интервалом между протираниями не менее 30 мин.

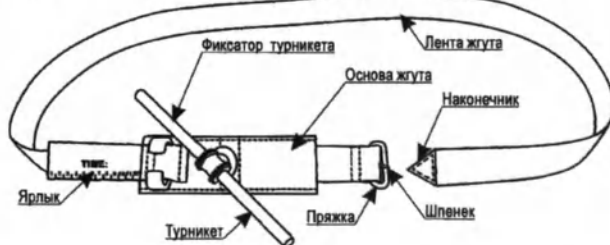

Макет маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в потребительской упаковке (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)

Лицо

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2


ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
кровоостанавливающий
с дозированной компрессией
«ФЭСТ»**

ТУ 32.50.13-248-10973749-2022

Вариант исполнения:

Жгут кровоостанавливающий – 2 (ширина 40 мм),
тип А - лента жгута без наконечника
ПУ №

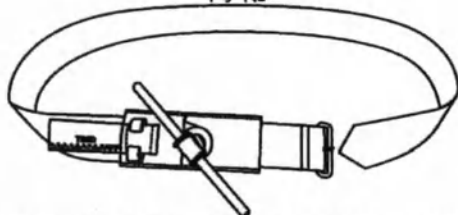

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 01.2022
Партия № 001

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Артикул:

Оборот

Руководство по эксплуатации

«Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи, для предотвращения кровопотери.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспаление тканей или нагноительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (может привести к распространению инфекции и летальному исходу);
- открытый перелом конечности или открытая рана в области наложения жгута (может вызвать ещё большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- резко выраженный атеросклероз (ведёт к переполнению вен и при наличии в них тромбов – к тромбозам);
- наличие анаэробных инфекций.

Примечание: оценив риск угрозы жизни пострадавшего, врач может принять решение о наложении жгута, не смотря на вышеперечисленные противопоказания.

Порядок работы.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Обернуть жгут вокруг конечности выше места кровотечения. Продеть конец ленты жгута через пряжку. Затянуть ленту и зафиксировать её с помощью шпелек пряжки.

Вращательными движениями турникета, затянуть петлю до прекращения кровотечения или до прекращения прощупывания пульса. Турникет зафиксировать с помощью фиксатора.


На ярлыке жгута сделать отметку о времени наложения жгута. При повторном использовании, если отметку о предыдущем наложении жгута не удалось удалить в процессе дезинфекции, ярлык следует отрезать, а к жгуту прикрепить бирку с указанием времени наложения.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
2. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
3. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Дезинфекция.
Дезинфекцию жгута производят путем двух кратного протирания щеткой, салфеткой из бязи или марли, смоченной 1 - 3 % раствором хлорамина с интервалом между протираниями не менее 30 мин.

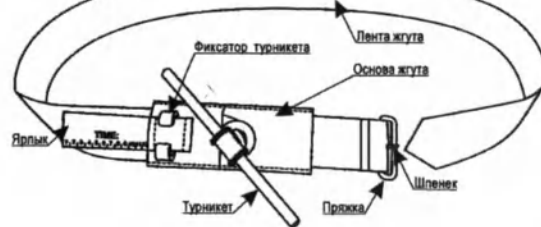

Макет маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в потребительской упаковке (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)

Лицо

Оборот

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2


ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
кровоостанавливающий
с дозированной компрессией
«ФЭСТ»**

ТУ 32.50.13-248-10973749-2022

Вариант исполнения:

Жгут кровоостанавливающий – 2 (ширина 40 мм),
тип Б - лента жгута с наконечником
ПУ №

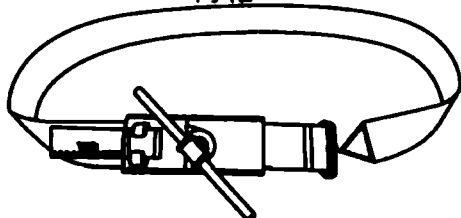

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМК» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 01.2022
Партия № 001

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°C.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Артикул:

Руководство по эксплуатации

«Жгут Михайлова» кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи, для предотвращения кровопотери.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспаление тканей или воспалительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (может привести к распространению инфекции и летальному исходу);
- открытый перелом конечности или открытая рана в области наложения жгута (может вызвать еще большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- резко выраженный атеросклероз (ведет к переполнению вен и при наложении в них тромбов – к тромбозам);
- наличие анаэробных инфекций.

Примечание: оценка риска угрозы жизни пострадавшего, врач может принять решение о наложении жгута, не смотря на вышеперечисленные противопоказания.

Порядок работы.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Обернуть жгут вокруг конечности выше места кровотечения.

Продеть конец ленты жгута через пряжку. Затянуть ленту и зафиксировать ее с помощью шпильки-пробки.

Вращательными движениями турникета затянуть петлю до прекращения кровотечения или до прекращения прощупывания пульса. Турникет зафиксировать с помощью фиксатора.

На ярлыке жгута сделать отметку о времени наложения жгута.

При повторном использовании, если отметку о предыдущем наложении жгута не удалось удалить в процессе дезинфекции, ярлык следует отрезать, а к жгуту прикрепить бирку с указанием времени наложения.


Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Дезинфекция.

Дезинфекцию жгута производят путем двух кратного протирания щеткой, салфеткой из бязи или марли, смоченной 1-3 % раствором хлорамина с интервалом между протираниями не менее 30 мин.

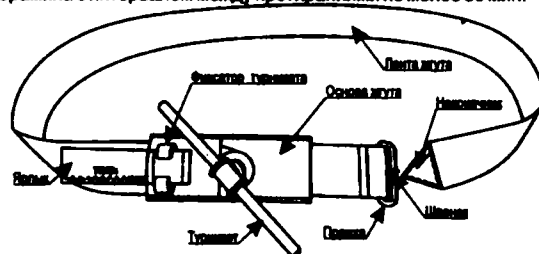

Макет маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в транспортной таре (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
 Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
 ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
 кровоостанавливающий
 с дозированной компрессией «ФЭСТ»
 ТУ 32.50.13-248-10973749-2022**

Вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий – 1
 (ширина 25 мм), тип А - лента жгута без наконечника
 РУ №
 Артикул:

Количество
 Партия №/ ОКК
 Изготовлено


Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С.

Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в транспортной таре (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)

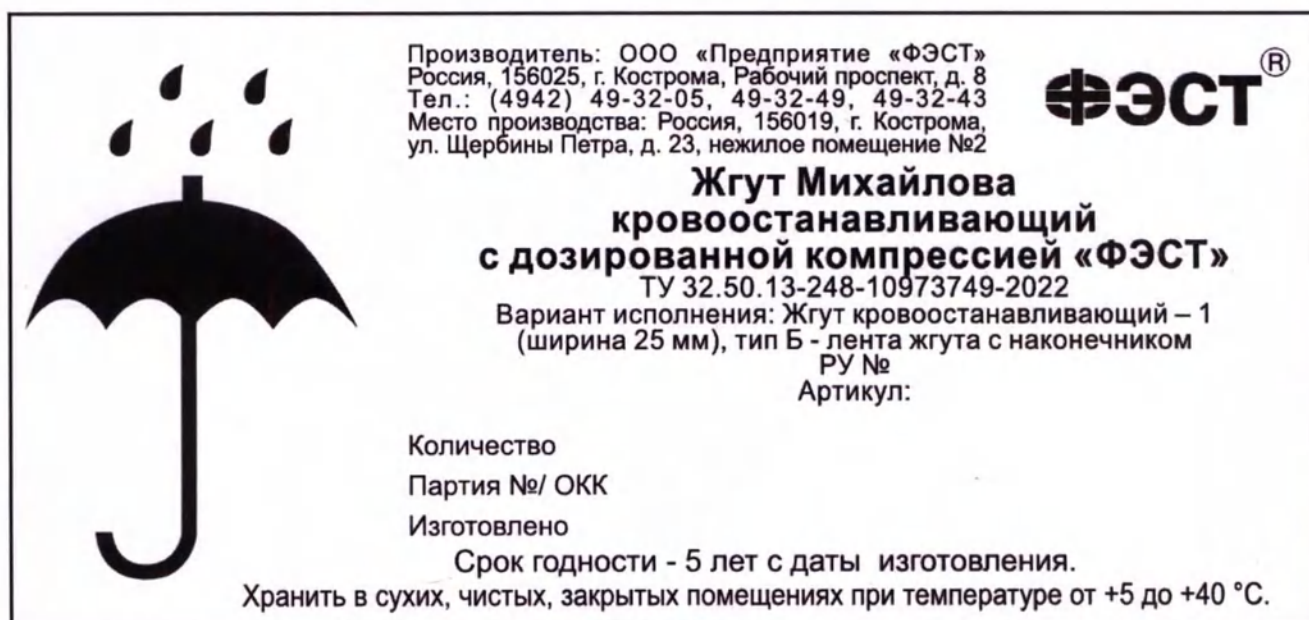

Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 1 (ширина 25 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в транспортной таре (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
кровоостанавливающий
с дозированной компрессией «ФЭСТ»**
ТУ 32.50.13-248-10973749-2022
Вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий – 2
(ширина 40 мм), тип А - лента жгута без наконечника
РУ №
Артикул:

Количество
Партия №/ ОКК
Изготовлено
Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С.

Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип А - лента жгута без наконечника)



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» в транспортной таре (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)

	Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ» Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43 Место производства: Россия, 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2	
	Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» ТУ 32.50.13-248-10973749-2022	
	Вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий – 2 (ширина 40 мм), тип Б - лента жгута с наконечником РУ № Артикул:	
	Количество Партия №/ ОКК Изготовлено Срок годности - 5 лет с даты изготовления.	
	Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С.	

Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий с дозированной компрессией «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 248 – 10973749 – 2022» (вариант исполнения: Жгут кровоостанавливающий - 2 (ширина 40 мм), Тип Б - лента жгута с наконечником)

Прошито, пронумеровано,
опечатано

15 (пятнадцать) листов

Директор Касаткина Э.В.

