
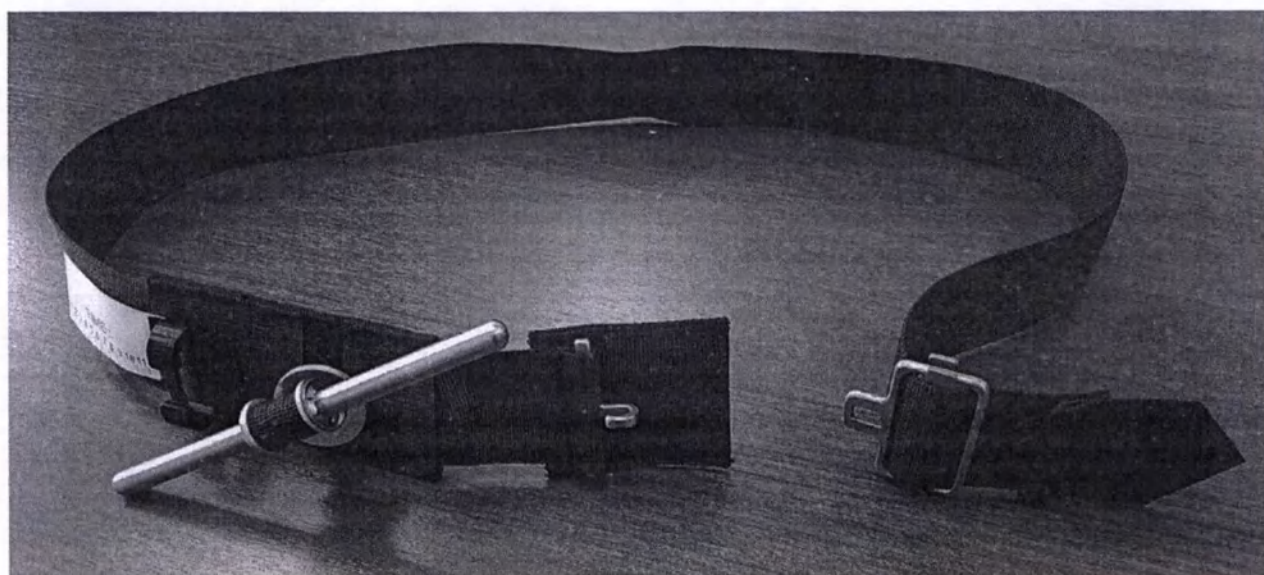



Фотографические изображения медицинского изделия

Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024, в составе:


- 1. Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024 – 1 шт.*
- 2. Инструкция по использованию – 1 шт.*

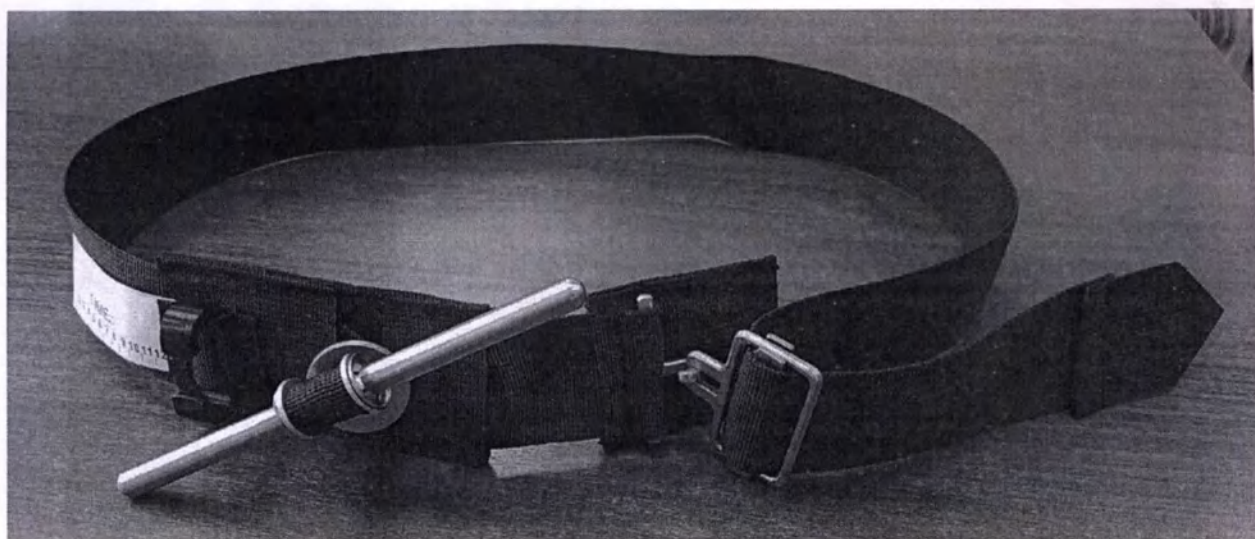

Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024»

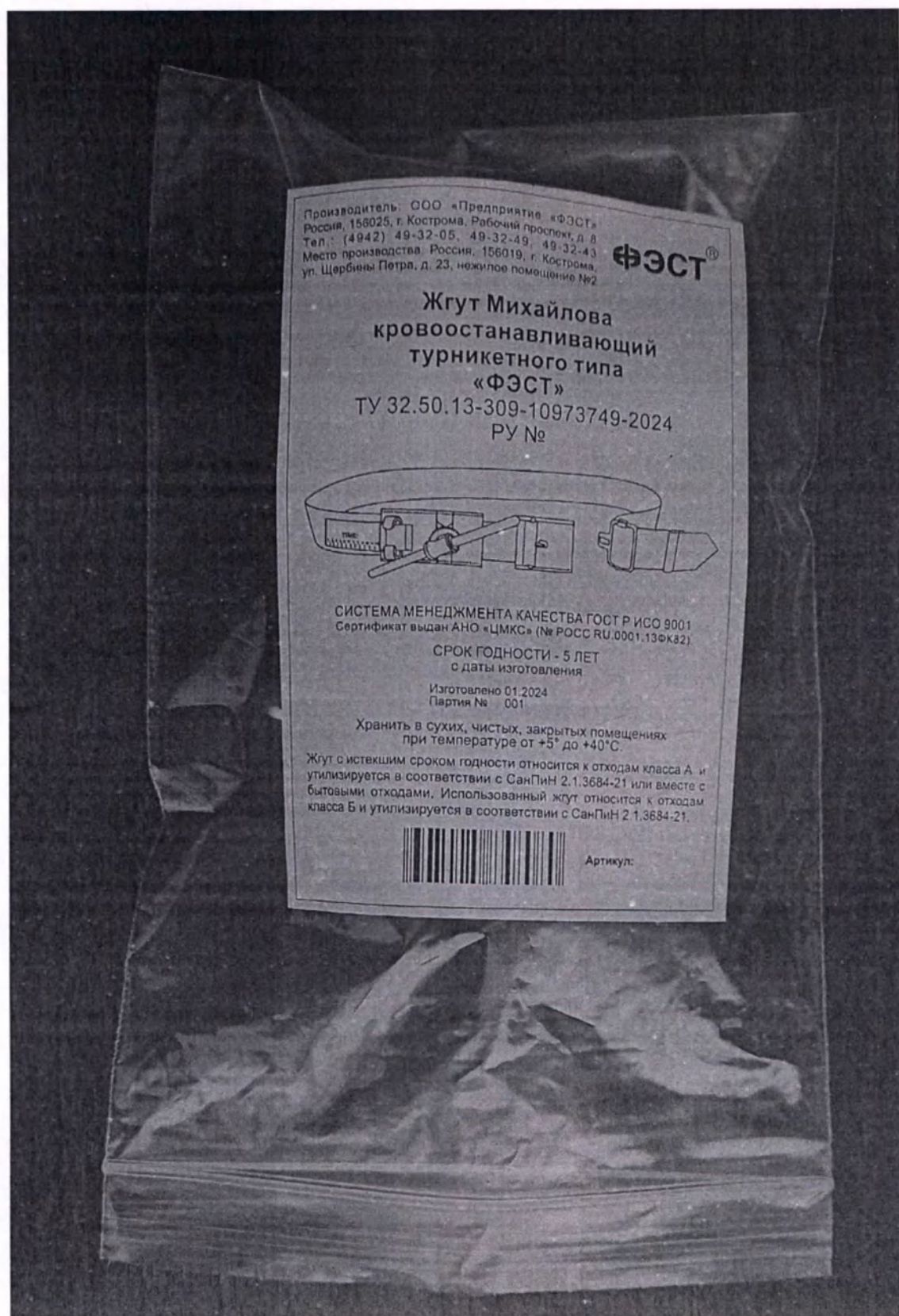

Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024» в потребительской упаковке

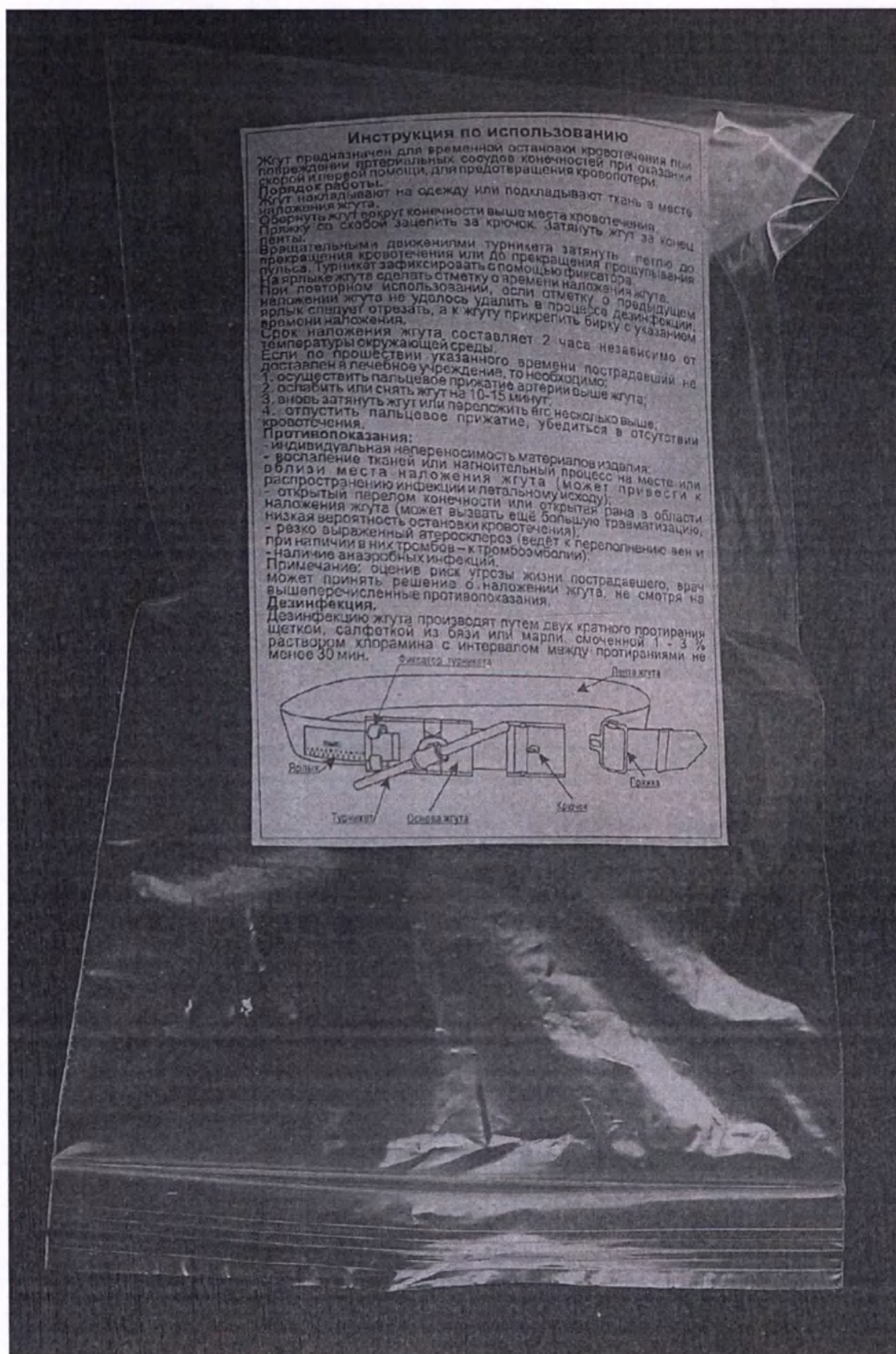


Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024» в потребительской упаковке

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова
кровоостанавливающий
турникетного типа
«ФЭСТ»**

**ТУ 32.50.13-309-10973749-2024
РУ №**

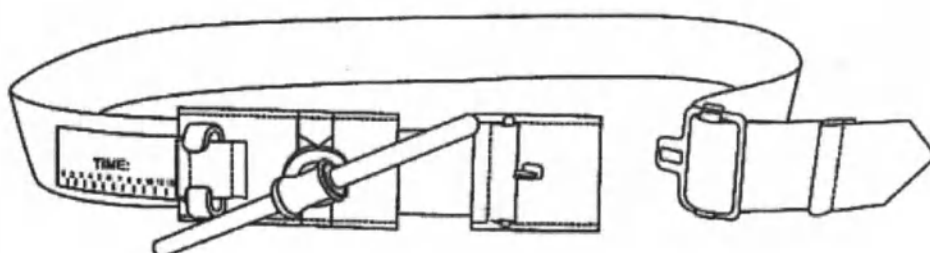

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 01.2024
Партия № 001

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5° до +40°С.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Артикул:

Общий вид маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова
кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 –
10973749 – 2024»

Инструкция по использованию

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи, для предотвращения кровопотери.

Порядок работы.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Обернуть жгут вокруг конечности выше места кровотечения.

Пряжку со скобой зацепить за крючок. Затянуть жгут за конец ленты.

Вращательными движениями турникета затянуть петлю до прекращения кровотечения или до прекращения прощупывания пульса. Турникет зафиксировать с помощью фиксатора.

На ярлыке жгута сделать отметку о времени наложения жгута.

При повторном использовании, если отметку о предыдущем наложении жгута не удалось удалить в процессе дезинфекции, ярлык следует отрезать, а к жгуту прикрепить бирку с указанием времени наложения.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- воспаление тканей или нагноительный процесс на месте или вблизи места наложения жгута (может привести к распространению инфекции и летальному исходу);
- открытый перелом конечности или открытая рана в области наложения жгута (может вызвать ещё большую травматизацию, низкая вероятность остановки кровотечения);
- резко выраженный атеросклероз (ведёт к переполнению вен и при наличии в них тромбов – к тромбоэмболии);
- наличие анаэробных инфекций.

Примечание: оценив риск угрозы жизни пострадавшего, врач может принять решение о наложении жгута, не смотря на вышеперечисленные противопоказания.

Дезинфекция.


Дезинфекцию жгута производят путем двух кратного протирания щеткой, салфеткой из бязи или марли, смоченной 1 - 3 % раствором хлорамина с интервалом между протираниями не менее 30 мин.



Общий вид маркировки медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024»



Общий вид медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024» в транспортной таре с маркировкой

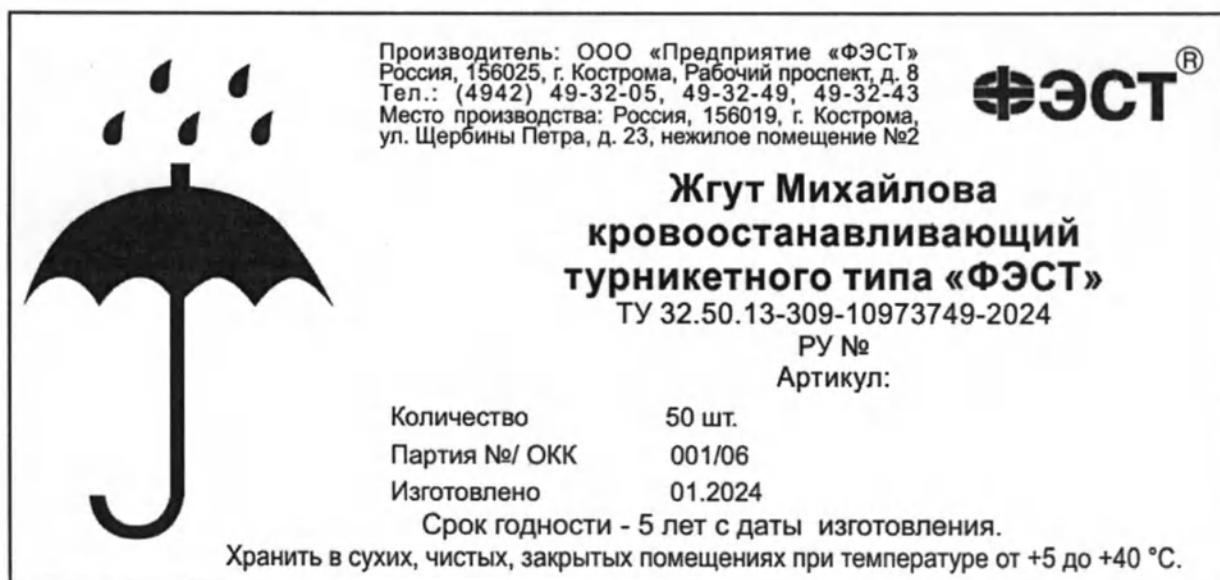

Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Жгут Михайлова кровоостанавливающий турникетного типа «ФЭСТ» по ТУ 32.50.13 – 309 – 10973749 – 2024»

Прошито, пронумеровано,
опечатано

7 (Серия)

Листов

Директор Касаткина Э.В.

