

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
Регистрации и Сертификации,
Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А.П. Харитонова
«27» августа 2024 г.
М.П.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Кардиологическое информационное программное
обеспечение MUSE с принадлежностями**

Список редактирования по Дата, время теста
327 элементов, соответствующих Все тесты

Варианты списка редактирования	Ид. код пациента	Имя, фамилия	Дата, время	Тип теста	Формат	Состояние	Несоответ. (Да/Нет)	Локальный адрес
Просматриваемые столбцы	МАРАМЗИНА260201	МАРАМЗИНА, АЛЕКСАНДРА	окт-05 12 14	ECG		Newly Acquired	Yes	
Критерии сортировки	МАЗИТОВА	МАЗИТОВА, ЗАРИНА	окт-05 10 39	ECG		Newly Acquired	Yes	
Критерии выбора	ХАРИСОВА	ХАРИСОВА, ГУЛЬНУР	окт-04 13 32	ECG		Newly Acquired	Yes	
Выбор пациента и предв. параметров	ХАРИСОВА	ХАРИСОВА, ГУЛЬНУР	окт-04 13 31	ECG		Newly Acquired	Yes	
Выбор пациента по ид. коду	ЕММ070616	ЕГОРОВ, МАКАР	окт-04 10 10	ECG		Newly Acquired	Yes	
Предв. наборы параметров	ФАД171106	ФАТХУЛЛИНА, А	окт-04 10 00	ECG		Newly Acquired	Yes	
ЭКГ_сто	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14:30	ECG		Newly Acquired	Yes	
ЭКГ покоя	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14:29	ECG		Newly Acquired	Yes	
Результаты мониторингирования	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14:29	ECG		Newly Acquired	Yes	
Стресс-тесты	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14:28	ECG		Newly Acquired	Yes	
Результаты ЭХО_КГ_КАГ	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14:28	ECG		Newly Acquired	Yes	
Моя корзина	Ч240916	ЧЕКМЕНЕВА,	сен-29 14:14	ECG		Newly Acquired	Yes	
Мои последние правки	ШСР290508	ШАРИПОВА Д.О.С	сен-28 13:52	ECG		Newly Acquired	Yes	
Все тесты	ЗАС140716	ЗАМОТИН, А.С	сен-27 14:24	ECG		Newly Acquired	Yes	
управление предв. параметрами	ХРР200716	ХАБИРОВА, РАЯНА	сен-27 13:02	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЯВВ160301	ЯКОВЛЕВА, А	сен-16 10:53	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЯВВ 240599	ЯКИМОВА, В	сен-16 10:45	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ПАА 041212	ПАВЛОВ, А	сен-15 10:41	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ПАА 041212	ПАВЛОВ, А	сен-15 10:40	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЗНА291007	ЗЫКОВ, Н	сен-15 10:36	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЗНА291007	ЗЫКОВ, Н	сен-15 10:34	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ХДИ100602	ХАСАНОВА, Д	сен-15 10:28	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ХДИ100602	ХАСАНОВА, Д	сен-15 10:27	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЮДД240901	ЮЩЕВ, Д	сен-15 10:21	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЮДД240901	ЮЩЕВ, Д	сен-15 10:20	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ФИО010599	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	сен-14 13:05	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ, ТЕСТ-ДЕМО	сен-14 11:19	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ-ДЕМО, ТЕСТ-ДЕМО	авг-11 16:55	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ-ДЕМО, ТЕСТ-ДЕМО	авг-11 16:35	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ-ДЕМО, ТЕСТ-ДЕМО	авг-11 16:35	ECG		Newly Acquired	Yes	

Список считывания тестов и (или) заказов - нет текущего поиска

Тест, заказ	Пациент	Ид. код базы данных тестов	Ид. код пациента	Имя, фамилия	Дата, время	Тип теста	Формат	Состояние	Несоответ. (Да/Нет)	Локальный адрес
Ид. код пациента:										
Фамилия:										
Имя:										
Сопоставить фонетически	☐									
Дата теста:	06-Jun-2021									
Тип теста:	Все									
№ заказа:										
Поиск	Прочее...									



Список редактирования по Дата, время теста
327 элементов, соответствующих Все тесты

Варианты списка редактирования	Ид. код пациента	Имя, фамилия	Дата, время	Тип теста	Формат	Состояние	Несоответв. (Да/Нет)	Локальный адрес
Просматриваемые столбцы	МАРАМЗИНА260201	МАРАМЗИНА, АЛЕКСАНДРА	окт-05 12 14	ECG		Newly Acquired	Yes	
Критерии сортировки	МАЗИТОВА	МАЗИТОВА, ЗАРИНА	окт-05 10 39	ECG		Newly Acquired	Yes	
Критерии выбора	ХАРИСОВА	ХАРИСОВА, ГУЛЬНУР	окт-04 13 32	ECG		Newly Acquired	Yes	
Выбор пациента и предв. параметров	ХАРИСОВА	ХАРИСОВА, ГУЛЬНУР	окт-04 13 31	ECG		Newly Acquired	Yes	
Выбор пациента по ид. коду	ЕММ070616	ЕГОРОВ, МАКАР	окт-04 10 10	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ФАД171106	ФАТХУЛЛИНА, А	окт-04 10 00	ECG		Newly Acquired	Yes	
Предв. наборы параметров	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14 30	ECG		Newly Acquired	Yes	
ЭКГ_сто	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14 29	ECG		Newly Acquired	Yes	
ЭКГ покоя	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14 29	ECG		Newly Acquired	Yes	
Результаты мониторингирования	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14 28	ECG		Newly Acquired	Yes	
Стресс-тесты	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14 28	ECG		Newly Acquired	Yes	
Результаты ЭХО_КГ_КАГ	СВВ300602	СЕРГЕЕВ БОЛ КРОН, В	сен-29 14 28	ECG		Newly Acquired	Yes	
Моя корзина	Ч240916	ЧЕКМЕНЕВА	сен-29 14 14	ECG		Newly Acquired	Yes	
Мои последние правки	ШСР290508	ШАРИПОВА Д.О.С	сен-28 13 52	ECG		Newly Acquired	Yes	
Все тесты	ЗАС140716	ЗАМОТИН, А.С	сен-27 14 24	ECG		Newly Acquired	Yes	
управление предв. параметрами	ХРР200716	ХАБИРОВА, РАЯНА	сен-27 13 02	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЯВВ160301	ЯКОВЛЕВА, А	сен-16 10 53	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЯВВ 240599	ЯКИМОВА, В	сен-16 10 45	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ПАА 041212	ПАВЛОВ, А	сен-15 10 41	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ПАА 041212	ПАВЛОВ, А	сен-15 10 40	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЗНА291007	ЗЫКОВ, Н	сен-15 10 36	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЗНА291007	ЗЫКОВ, Н	сен-15 10 34	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ХДИ100602	ХАСАНОВА, Д	сен-15 10 28	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ХДИ100602	ХАСАНОВА, Д	сен-15 10 27	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЮДД240901	ЮЩЕВ, Д	сен-15 10 21	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ЮДД240901	ЮЩЕВ, Д	сен-15 10 20	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ФИО010599	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	сен-14 13 05	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ, ТЕСТ-ДЕМО	сен-14 11 19	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ-ДЕМО, ТЕСТ-ДЕМО	авг-11 16 55	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ-ДЕМО, ТЕСТ-ДЕМО	авг-11 16 35	ECG		Newly Acquired	Yes	
	ТЕСТ ДЕМО 000000	ТЕСТ-ДЕМО, ТЕСТ-ДЕМО	авг-11 16 35	ECG		Newly Acquired	Yes	

Список считывания тестов и (или) заказов - нет текущего поиска

Тест, заказ	Пациент	Ид. код базы данных тестов	Ид. код пациента	Имя, фамилия	Дата, время	Тип теста	Формат	Состояние	Несоответв. (Да/Нет)	Локальный адрес
Ид. код пациента: Фамилия: Имя: Сопоставить фонетически ☐ Дата теста: 08-Jun-2021 Тип теста: Все № заказа: Поиск Прочее...										

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2

Руководство пользователя

2302021-261-3



2302021-261
Редакция 3
Russian | Русский
© 2022, 2023 General Electric
Company
Все права защищены.

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.

Руководство по эксплуатации.

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2

Руководство пользователя веб-клиента

2302021-262-3



2302021-262

Редакция 3

Russian | Русский

© 2022, 2023 General Electric
Company

Все права защищены.

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.

Руководство по эксплуатации.

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2
Руководство по нормативным требованиям и технике безопасности
2302021-263-3



2302021-263
Редакция 3
Russian | Русский
© 2022, 2023 General Electric
Company
Все права защищены

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2

Руководство администратора

2302021-265-3



2302021-265
Редакция 3
Russian | Русский
© 2022, 2023 General Electric
Company
Все права защищены

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.




Рабочий список

1. Используйте панель поиска для поиска пациента по фамилии, по фамилии и имени или по идентификационному коду пациента.
2. Вкладки Рабочего списка, доступные по умолчанию: **Моя входящая корзина**, **Все неподтвержденные** и **Недавние изменения**.
3. Перетащите, чтобы изменить положение и ширину столбца **Рабочий список**.
4. Выберите тест пациента, чтобы просмотреть, отредактировать, распечатать и подтвердить его.
5. Количество тестов указывает на количество тестов в вашем **Рабочем списке**. Каждый раз, когда вы обновляете представление **Рабочего списка**, количество тестов также обновляется. Оно может изменяться при запросе или подтверждении новых тестов.
6. Системное меню отображает имя пользователя после входа в систему веб-клиента. Выберите стрелку для открытия и просмотра информации **О программе**, справки в Интернете, окна **Настройки** и завершения сеанса пользователя. Окно **Настройки** отображается только при наличии у вас полномочий администратора.
7. Показывает дату и время обновления представления **Рабочего списка**.

The screenshot shows a web application interface for a 'Worklist'. At the top, there is a search bar (1) and several tabs (2). The main area is a table with columns for patient information and test results. A row is highlighted with a mouse cursor (4). On the right side, there is a system menu (6) and a timestamp (7). A scrollbar is visible on the right edge of the table.

Модуль редактирования диагноза

1. Исходное диагностическое заключение включает диагноз 12SL, результаты последовательного сравнения и подпись. Исходный диагноз 12SL представляет собой черный текст на сером фоне.
2. Введите произвольный текст. Произвольный текст окрашивается в фиолетовый цвет после его ввода, затем — в синий после нажатия клавиши **Enter** на клавиатуре.
3. Добавьте сокращенное заключение из списка сокращенных заключений в режиме согласования. Введенный вами текст библиотеки заключений отображается черным цветом.
4. Если диагноз длинный, выберите шеврон, чтобы развернуть текстовую область диагноза.
5. Используйте полосу прокрутки для вертикальной прокрутки.
6. После редактирования теста выберите **Дополнительно**, чтобы просмотреть раскрывающееся меню доступных элементов.
7. Нажмите **Подтвердить**, чтобы подтвердить, сохранить и закрыть тест пациента. После закрытия теста в Редакторе отчетов автоматически откроется следующий тест из Рабочего списка. (Только при редактировании в веб-клиенте)

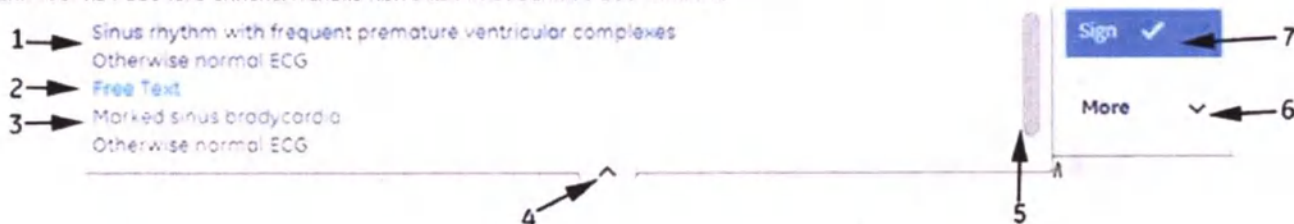

e MUSE Cardiology Information System with accessories

кардиологическое информационное программное обеспечение MUSE с принадлежностями

addendum to user manual for Russian Federation

приложение к руководству пользователя для Российской Федерации

document number


номер документа

Руководство по эксплуатации.

Текущая ЭКГ Измерения Контурский формат Последовательное представление (Нет предыдущего)

Ид. код пациента: 00010 желудочков Частота: 90 90 сокр./мин.
 Фамилия, имя: Test 15 leadv10 PR, QRS: 134 96 мсек
 Дата, время теста: 31-января-2016 06:57:33 Пон. QT, QTc: 326 398 мсек
 Возраст, дата рождения: Ось PRT: 30 51 46 °
 Рост, вес (cm, kg): АД: / мм рт.
 Локальный адрес: ECG Department No ADT record for patient

Normal sinus rhythm
 Possible Left atrial enlargement
 RSR' or QR pattern in V1 suggests right ventricular conduction delay
 Left ventricular hypertrophy
 Cannot rule out Septal infarct, age undetermined
 No previous ECGs available

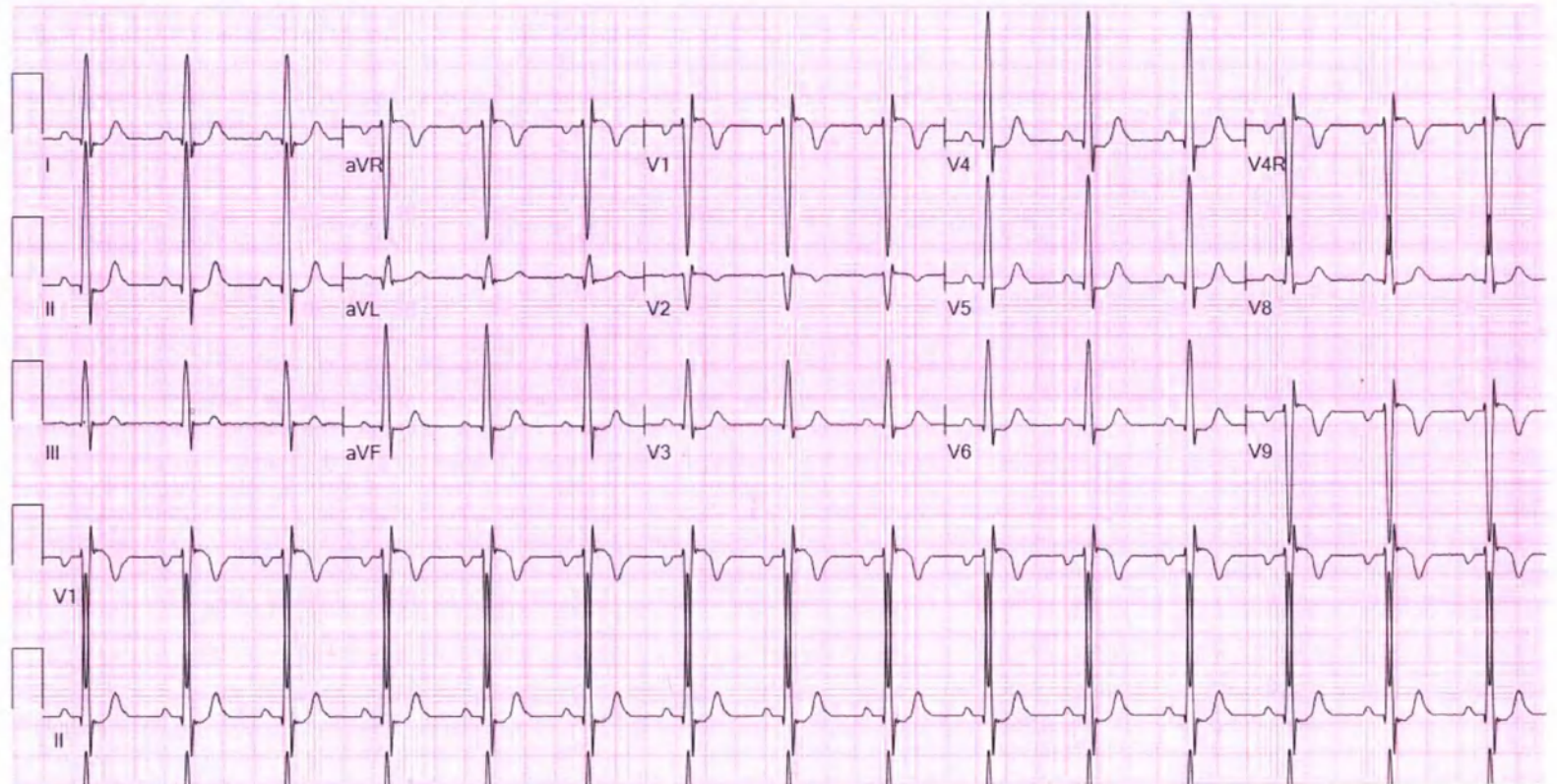

MUSE™



Название изделия: MUSE™

Выпуск продукта: NX

Версия ПО: 10.2.3.172

UDI

1)00195278458070(10)MUSENXR2SP3

SN

345



24-01

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

100 Innovation Drive

Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть

Модуль лицензии программного обеспечения для клиентских станций на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

MUSE™



Название изделия: MUSE™

Впуск продукта: NX

Версия ПО: 10.2.3.172

UDI

(00195278458070(10)MUSENXR2SP3

SN

045



04-01

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

100 Innovation Drive

Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть

Модуль лицензии программного обеспечения на 1 рабочую станцию на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе, не более 10000 шт.



Название изделия: MUSE™

Выпуск продукта: NX

Версия ПО: 10.2.3.172

UDI

0100195278458070(10)MUSENXR2SP3

SN

0345



024.01

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

100 Innovation Drive

Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть

доль лицензии программного обеспечения для обработки данных до 100 000 ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе, не более 10000 шт.



Название изделия: MUSE™

Выпуск продукта: NX

Версия ПО: 10.2.3.172

UDI

U100195278458070(10)MUSENXR2SP3

SN

345



024-01

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

900 Innovation Drive

Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть

Модуль лицензии программного обеспечения для обработки данных более 100 000 ЭКГ на физических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе, не более 1000 шт.



Название изделия: MUSE™

Выпуск продукта: NX

Версия ПО: 10.2.3.172

UDI

00195278458070(10)MUSENXR2SP3

SN

345



024-01

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

900 Innovation Drive

Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть

доль лицензии программного обеспечения для обработки данных в неограниченном количестве на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.



Название изделия: MUSE™

Выпуск продукта: NX

Версия ПО: 10.2.3.172

UDI

01)00195278458070(10)MUSENXR2SP3

SN

345



024-01

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

900 Innovation Drive

Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть



Дополнительный модуль лицензии программного обеспечения на 1 рабочую станцию на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе, не более 10000 шт.

Идентификатор типа теста ▲	Имя, фамилия	Сокращение	Определяется системой	Включено
1	Resting ECG	ECG	Yes	Yes
2	Pacemaker	PCK	Yes	No
3	HiResolution ECG	LP	Yes	Yes
4	Exercise Testing	GXT	Yes	Yes
5	Holter	HOL	Yes	Yes
6	Cath Lab	CAH	Yes	Yes
7	Echo	EKO	Yes	Yes
8	Defib	DEF	Yes	No
9	Discharge Summary	DIS	Yes	No
10	History	H&P	Yes	No
11	Event Recorder	EVR	Yes	No
12	Nuclear	NUC	Yes	No
13	Surgery	SUR	Yes	No
14	Electrophysiology	EPS	Yes	No
15	Chest Pain	CPA	Yes	No
16	Spirometry	PFT	Yes	Yes
17	Ambulatory BP	ABP	Yes	Yes
18	Ergospirometry	EPF	Yes	Yes
19	Rhythm	RHY	Yes	Yes
33	Monitoring Strip Report	MSR	No	Yes
34	Sven	SH	No	No


Модуль программный для редактирования тестов с нагрузкой (стресс ЭКГ).

Ид. код формата ▲	Тип	Имя	По умолчанию
1	General	General Settings	Yes
2	ECG	Resting ECG Settings	Yes
3	HiRes	HiResolution ECG Settings	Yes
4	Stress	Stress Settings	Yes
5	Holter	Holter Settings	Yes
6	ECG	Resting ECG Color Settings	No
7	Stress	Stress Color Settings	No
8	Holter	Holter Color Settings	No
9	HiRes	HiRes Color Settings	No
10	ECG	Web Resting ECG Settings	No
11	ECG	Remove Patient Information	No
12	ECG	Test ECG Format	No
13	ECG	15 Lead Pediatric Web Format	No
14	Monitoring Strip Report	Imported ECG Tracing Settings	Yes
16	Echo	Echo Settings	Yes
17	Cath	Cath Lab Settings	Yes
18	Ambulatory BP	Ambulatory BP Settings	Yes
19	Spirometry	Spirometry Settings	Yes
1020	Ergospirometry	Ergospirometry Settings	Yes
2020	Rhythm	Rhythm Settings	Yes

Модуль программный для редактирования результатов холтеровского анализа.

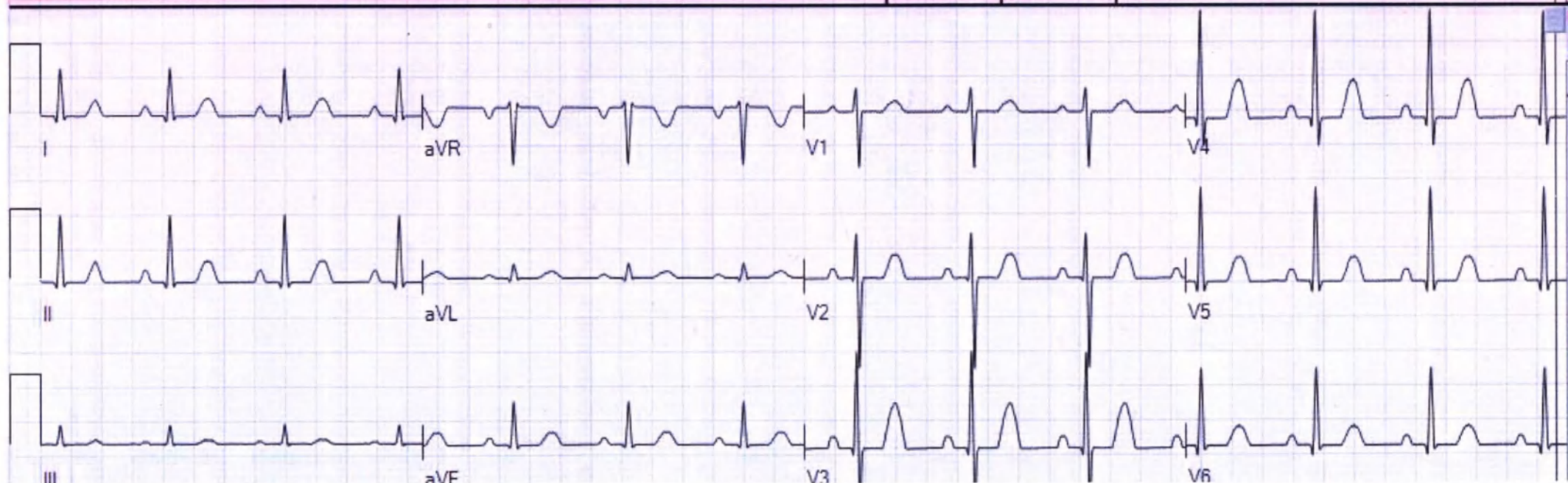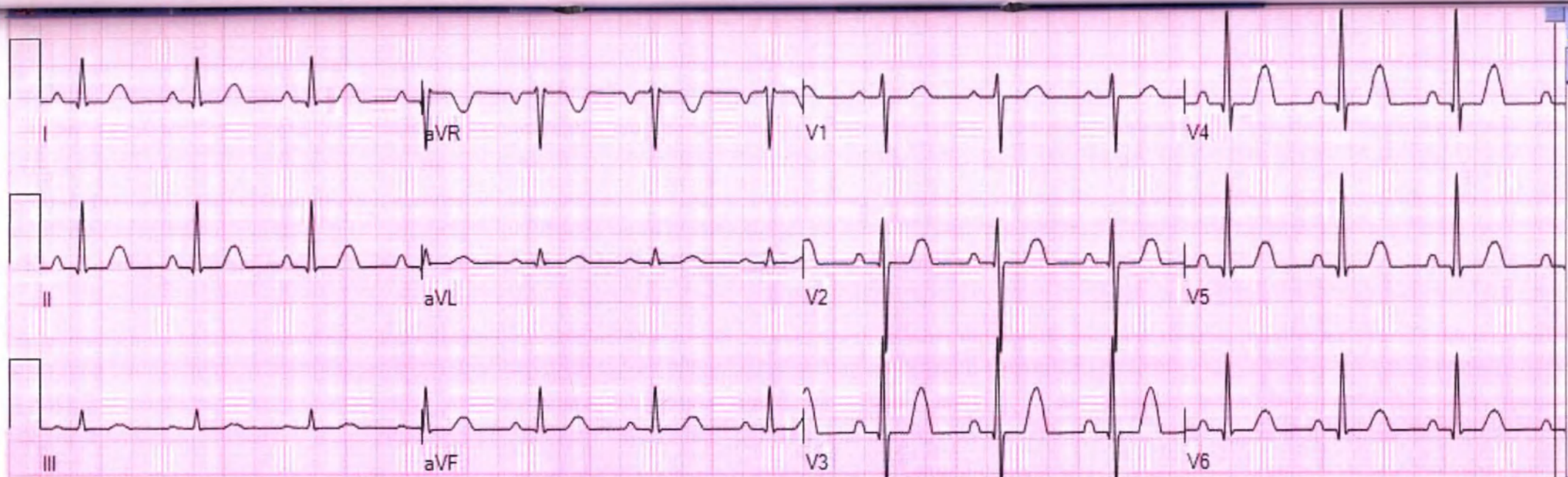

Программный ключ активации для последовательного сравнения ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

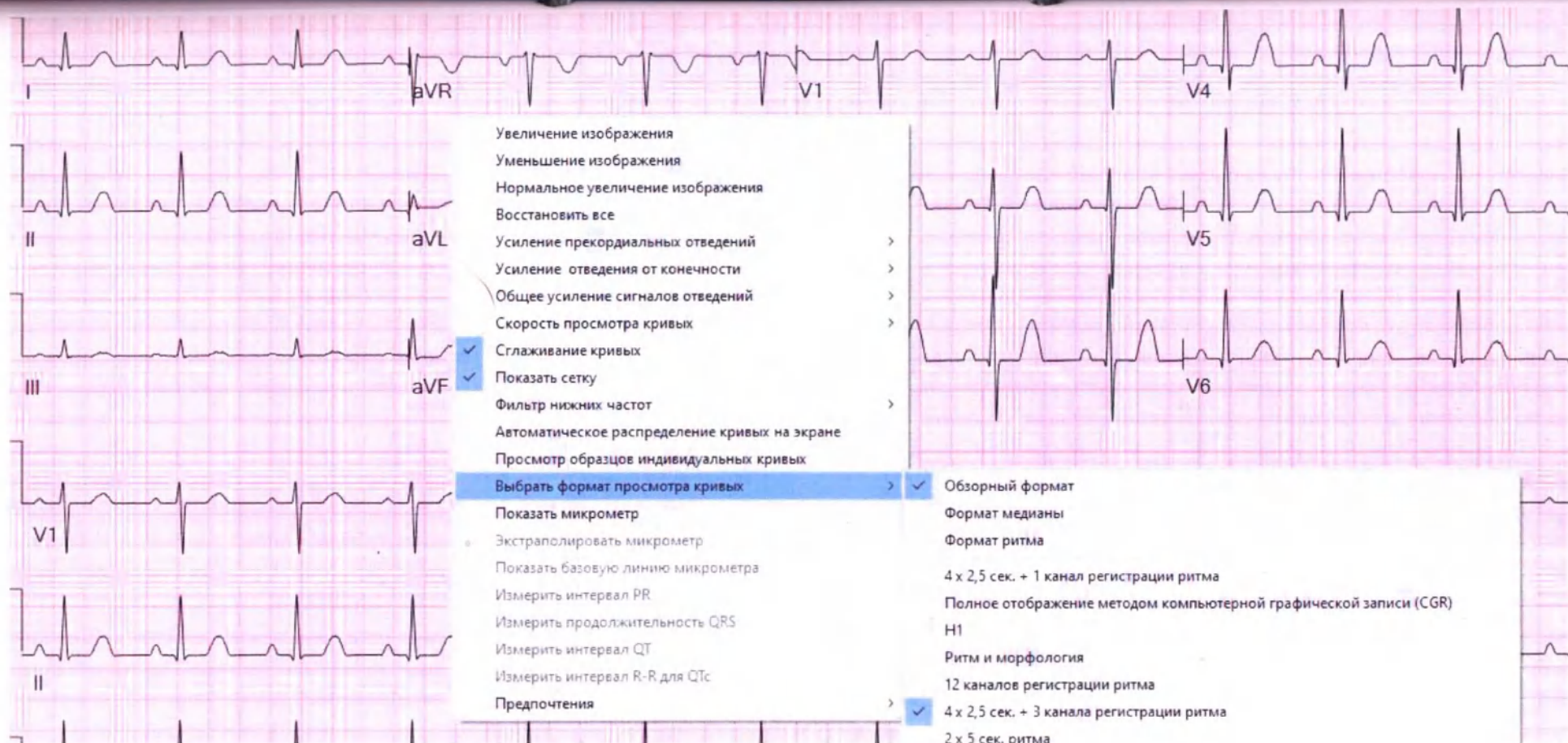

Программный ключ активации расширенного редактора ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие настройки

Общие параметры

Функции для опытных пользо

Титульная страница факса

Параметры электронной поч

Параметры типа теста

➔ E14

Параметры больничной информ

Общие параметры

Правила слияния

Запрос данных о госпитализа

Параметры модуля редактирова

Общие параметры

Режим просмотра медиан

Режим просмотра необработ

☐ Включить назначенных контролеров / многократных контролеров

☐ Не копируйте результаты анализа, назначая тесты контролерам, блокированным E14

☐ Блокировка демографических данных

☐ Блокировка даты рождения и возраста

☐ Блокировка пола пациента

Программный ключ активации редактора ЭКГ для фармацевтических исследований на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие настройки

Общие параметры

➔ **Функции для опытных пользо**

Титульная страница факса

Параметры электронной поч

Параметры типа теста

E14

Параметры больничной информ

Общие параметры

Правила слияния

Запрос данных о госпитализа

Параметры модуля редактирова

Общие параметры

Режим просмотра медиан

Режим просмотра необработ

Дата, время создания: 29-авг-2011 20:44:45

Дата, время изменения: 26-окт-2020 15:08:41

Отчет по умолчанию: Resting ECG

- | | |
|--|---|
| ☐ Включить функцию дистанционного опроса кардиологической системы CSI | ☐ Использовать местоположение тележки вместо местоположения заказа |
| ☐ Включить функцию контроля согласно разделу 11 тома 21 Свода федеральных постановлений США | ☒ <u>Разрешить повторный анализ</u> |
| ☐ Разрешить использование временных устройств | |
| ☐ Удалять начальные нули ид. кода пациента | |
| ☐ Заполнение демографических данных при включенном получении данных | |
| ☐ Требовать ввод пароля при сохранении | |

Сообщение электронной подписи 21 CFR часть 11:

Completing this signature by entering your password is the legally binding equivalent of your handwritten signature

Ид. код формата ▲	Тип	Имя	По умолчанию
1	General	General Settings	Yes
2	ECG	Resting ECG Settings	Yes
3	HiRes	HiResolution ECG Settings	Yes
4	Stress	Stress Settings	Yes
5	Holter	Holter Settings	Yes
6	ECG	Resting ECG Color Settings	No
7	Stress	Stress Color Settings	No
8	Holter	Holter Color Settings	No
9	HiRes	HiRes Color Settings	No
10	ECG	Web Resting ECG Settings	No
11	ECG	Remove Patient Information	No
12	ECG	Test ECG Format	No
13	ECG	15 Lead Pediatric Web Format	No
14	Monitoring Strip Report	Imported ECG Tracing Settings	Yes
16	Echo	Echo Settings	Yes
17	Cath	Cath Lab Settings	Yes
18	Ambulatory BP	Ambulatory BP Settings	Yes
19	Spirometry	Spirometry Settings	Yes
1020	Ergospirometry	Ergospirometry Settings	Yes
2020	Rhythm	Rhythm Settings	Yes

Программный ключ активации для получения данных с мониторов пациента на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Свойства общей папки

Общие параметры


Запись: c:\PDFimport\Mortara

Пример: \\Server\Share или C:\Folder

Фильтр имени файла: *.XML

Имя профиля: None

Интерфейс импорта данных в формате XML.

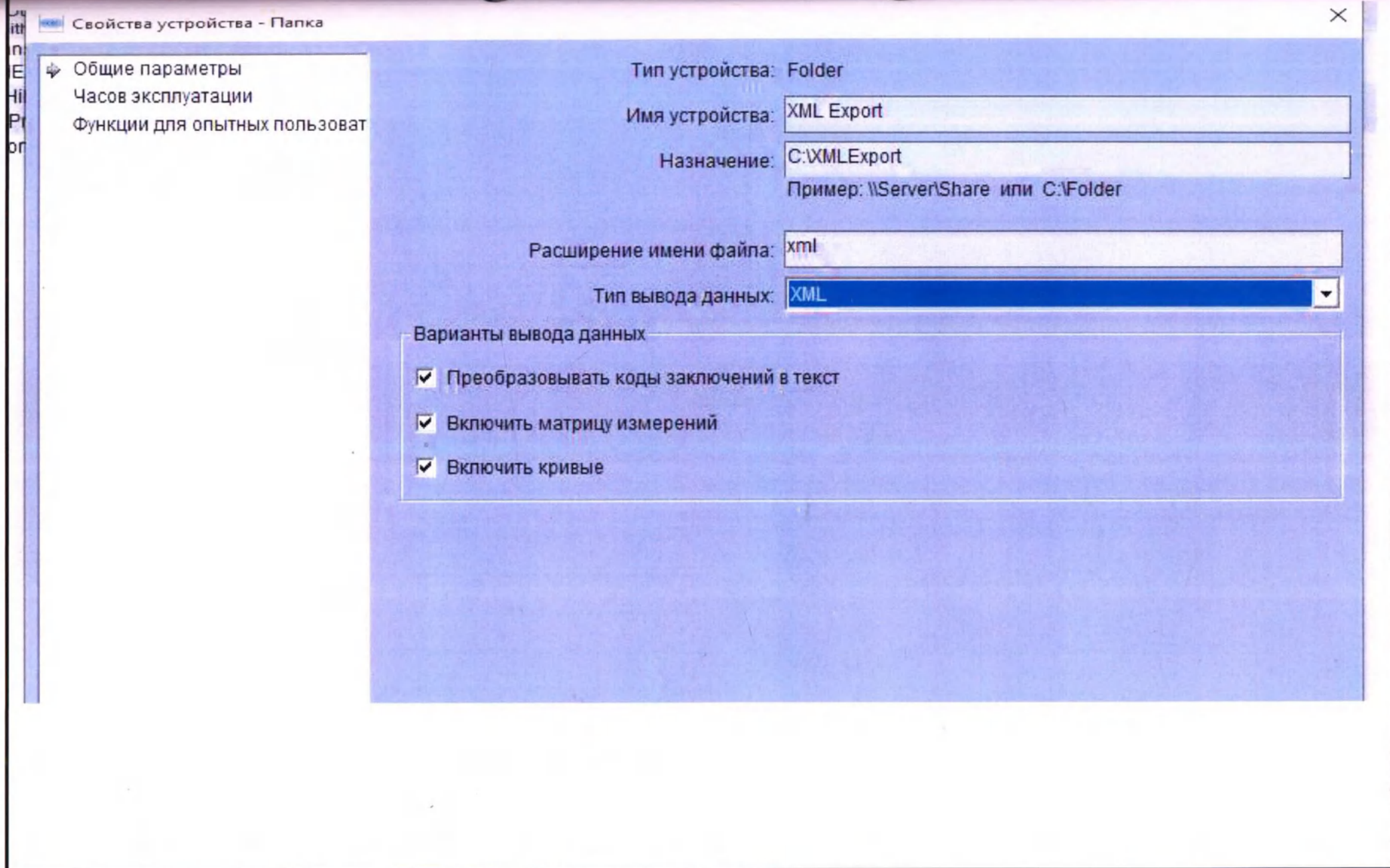

Интерфейс экспорта данных в формате XML.

Ид. код пациента:	TEST DEMO 000000		No ADT record for patient	
Фамилия, имя:	TEST-DEMO	TEST-DEMO	Направляющий врач:	
Дата, время теста:	16-дек-2019 12:29:05		Врач, оформляющий заказ:	
Возраст, дата рождения:	28-апр-1958 (61 Years)		Оператор сбора данн..	
Пол:	Male		Принимающий врач:	
Рост, вес (cm, kg):	178	78	Лечащий врач:	
Номер варианта:			Основной врач:	
Локальный адрес:	ECG Department		Редактор:	
Номер электрокар...	10	Номер палаты:	Ординатор:	
			Подтвердил:	
			Редакция даты и времени:	16-дек-2019 12:29:05
Лечащий врач:			№ заказа:	
Тип теста:			№ посещения:	
Протокол:	BRUCE		Номер счета:	
Причина проведения теста:			User Defined:	
			Вторичный ид. код:	TEST SECOND ID 0
			Шаблон отчета:	
				☐ Не выставлять счет Журнал регистрац...

Программный ключ активации электронной подписи и ведения электронных записей на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие настройки

Общие параметры

Функции для опытных пользо

Титульная страница факса

Параметры электронной поч

Параметры типа теста

E14

Параметры больничной информ

Общие параметры

Правила слияния

Запрос данных о госпитализа

Параметры модуля редактирова

Общие параметры

Режим просмотра медиан

Режим просмотра необработ

☒ Включить модуль редактирования интервалов

Общие параметры

Режим редактирования:

Raw

Фильтр:

None

Измерение частоты
вентрикулярных сокращений:

All Beats

Зафиксировать параметры модуля редактирования интервалов

☒ Режим редактирования☒ Кол-во сокращений☒ Фильтр☒ Разрешение☒ Методы выполнения глобальных☒ Измеряемые отведения

Измерения амплитуды

☒ Включить функцию редактирования амплитуды

Измерение амплитуды пиков:

Manual

Ширина окна измерения градиента между
пиками:

3

Свойства устройства - Планка

Общие параметры
Часов эксплуатации
Функции для опытных пользователей

Тип устройства: Folder

Имя устройства: XML Export

Назначение: C:\XMLExport
Пример: \\Server\Share или C:\Folder

Расширение имени файла: xml

Тип вывода данных: XML

Варианты вывода данных

- ☒ Преобразовывать коды заключений в текст
- ☒ Включить матрицу измерений
- ☒ Включить кривые

OK Закреть Применить

Интерфейс экспорта данных в формате XML согласно FDA формату.

Система Просмотр Операция Средства Справка

Навигация

- Система
- Сайты
- Пользователи
- Роли
- Устройства
- Форматы
- Модемы
- Расписание заданий
- Общая папка

Функции для опытных пользователей

- Типы тестов
- Профиль получения
- LDAP-поля
- LDAP-группы
- Услуги DICOM
- DICOM - Устройства

Сайт

- Локальные адреса
- Локальные адреса больничных информационных систем (HIS)
- Распределение отчетов
- Библиотека заключений
- Исследования лекарственных препаратов

Модемы 2 элементов

Ид. код модема	Тип	Компьютер	Порт	Битов в секунду	IP-адрес или имя хоста	Сетевой порт
1	CSI Network	MUSE9demo			192.168.0.71	3001
3	CSI Network	MUSE9demo			192.168.0.72	3001

Программный модуль удаленного доступа к данным системы MUSE.

Навигация

Система

- Система
- Сайты
- Пользователи
- Роли
- Устройства
- Форматы
- Модемы
- Расписание заданий
- Общая папка

Функции для опытных пользователей

- Типы тестов
- Профиль получения
- LDAP-поля
- LDAP-группы
- Услуги DICOM
- DICOM - Устройства

Сайт

- Локальные адреса
- Локальные адреса
больничных информационных
систем (HIS)
- Распределение отчетов
- Библиотека заключений
- Исследования лекарственных
препаратов

Модемы 2 элементов

Ид. код модема ▲	Тип	Компьютер	Порт	Битов в секунду	IP-адрес или имя хоста	Сетевой порт
1	CSI Network	MUSE9demo			192.168.0.71	3001
3	CSI Network	MUSE9demo			192.168.0.72	3001

Дополнительный программный модуль удаленного доступа к данным системы MUSE.



Модуль программный для Web-интерфейса к периферическим устройствам.

Система

Модуль редактирования тестов

Переход...

Тест

Средства

Средства представления кривых

Контурный формат
Интерпретация
Предварительный просмотр отчета
Дополнительный

Ид. код пациента: TEST DEMO 000000

Фамилия, имя: TEST-DEMO TEST-DEMO

Дата, время теста: 04-ноя-2015 15:57:53

Возраст, дата рождения: 28-ноя-1968 (47 Years)

Пол: Male

Рост, вес (cm, kg): Номер варианта:

Локальный адрес: Stress Lab

Номер электрокар: Номер палаты:

Лечащий врач:

Тип теста:

Протокол:

Причина проведения теста:

No ADT record for patient

Направляющий врач:

Врач, оформляющий заказ:

Оператор сбора данн...:

Принимающий врач:

Лечащий врач:

Основной врач:

Редактор:

Ординатор:

Подтвердил:

Редакция даты и времени:

№ заказа:

№ посещения:

Номер счета:

User Defined: ☐ Не выставлять счет

Вторичный ид. код:

Шаблон отчета:

Журнал регистрац...

Дополнительный программный модуль для программного обеспечения для стресса ЭКГ.

Система Переход Список Тест Пациент Средства Справка

Предварительный просмотр отчета Контурский формат Измерения

Интерпретация:

8/7/2018

Ид. код пациента: TEST DEMO 000

Фамилия, имя: TEST-DEMO TEST-DEMO

Дата, время теста: 29-авг-2018 10:56:15

Возраст, дата рожд.: 28-авг-1968 (50 Years)

Пол: Male

Рост, вес (cm, kg): Номер варианта:

Локальный адрес: Holter Scanning

Номер электрокард: Номер палаты:

Показания к тесту:

Длительность прие... 23:09:51

Причина обследования:

Тип теста:

Качество записи:

Комментарии ана...

No ADT record for patient

Направляющий врач:

Врач, оформляющ...

Оператор сбора дан...

Принимающий врач:

Лечащий врач:

Основной врач:

Редактор:

Ординатор:

Подтвердил:

Редакция даты и вр...

№ заказа:

№ посещения:

Номер счета:

User Defined: ☐ Не выставлять счет

Вторичный ид. код:

Журнал регистрац...

Средства представления кривых

Дополнительный программный модуль для программного обеспечения для холтеровского анализа.

MUSE

MUSE

Search by PID or Name

DEMOUser, User

My In-Basket

All Unconfirmed

Recent Edits

Patient ID	Last Name	First Name	Date/Time	Test Ty...	Status	Critical Values	Mismatch (Y...	Test Location	Site Name
TEST DEMO 00...	TEST-DEMO	TEST-DEMO	16-Dec-2019 12:29:05	GXT	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
232323232	123456789012...	1234567890	19-Oct-2016 10:15:32	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
1212334344			13-Jun-2016 13:14:47	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
1212334344			13-Jun-2016 13:14:47	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
00010	test	15 leadv10	31-Jan-2016 06:57:33	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
1234502	AFib	Demo	03-Mar-2015 08:00:00	HOL	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
26101974	Kershaw	Sam	23-Jul-2013 11:53:00	EPF	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
26101974	Kershaw	Sam	23-Jul-2013 11:50:00	EPF	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
26101974	Kershaw	Sam	23-Jul-2013 10:07:00	EPF	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
123612	Murphy	Private	24-Apr-2013 11:50:06	ECG	Newly Acquired		No		General Ho
07787773	KLEIN	RICHARD	30-Mar-2012 16:20:38	GXT	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
000199323	HANNA	JAMES	04-Jan-2012 22:26:29	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
000399323	Pringle	Glenn	04-Jan-2012 22:26:29	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H
234777345	CAMHD	Pacer	30-Nov-2009 14:16:25	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H
234765123	Johnson	Paul	03-Sep-2009 09:52:21	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H
999999999	Blank	Name	20-Mar-2008 10:30:57	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H

Total No. of items 20

Last updated on 08-Nov-2020 15:29:45

Программный ключ активации просмотра и редактирования в Web-интерфейсе на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

MUSE

MUSE

+

+

+

←

→

↺

🏠

🔗

https://vm-dcar-demo.cardiodemo.com/muse/main.html#/editlist

☆

★

🔍

📌

⋮

🔍

Search by PID or Name

DEMOUser, User

My In-Basket

All Unconfirmed

Recent Edits

Patient ID	Last Name	First Name	Date/Time	Test Ty...	Status	Critical Values	Mismatch (Y...	Test Location	Site Name
TEST DEMO 00...	TEST-DEMO	TEST-DEMO	16-Dec-2019 12:29:05	GXT	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
232323232	123456789012...	1234567890	19-Oct-2016 10:15:32	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
1212334344			13-Jun-2016 13:14:47	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
1212334344			13-Jun-2016 13:14:47	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
00010	test	15 leadv10	31-Jan-2016 06:57:33	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
1234502	AFib	Demo	03-Mar-2015 08:00:00	HOL	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
26101974	Kershaw	Sam	23-Jul-2013 11:53:00	EPF	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
26101974	Kershaw	Sam	23-Jul-2013 11:50:00	EPF	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
26101974	Kershaw	Sam	23-Jul-2013 10:07:00	EPF	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
123612	Murphy	Private	24-Apr-2013 11:50:06	ECG	Newly Acquired		No		General Ho
07787773	KLEIN	RICHARD	30-Mar-2012 16:20:38	GXT	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
000199323	HANNA	JAMES	04-Jan-2012 22:26:29	ECG	Newly Acquired		Yes	ECG	Memorial H
000399323	Pringle	Glenn	04-Jan-2012 22:26:29	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H
234777345	CAMHD	Pacer	30-Nov-2009 14:16:25	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H
234765123	Johnson	Paul	03-Sep-2009 09:52:21	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H
999999999	Blank	Name	20-Mar-2008 10:30:57	ECG	Updated		Yes	ECG	Memorial H

Total No. of items 20

Last updated on 08-Nov-2020 15:29:45

Программный ключ активации редактирования в Web-интерфейсе на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Сайты 6 элементов

Ид. код сайта	Включено	Имя	Число символов в ид. коде пациента	Единицы измерения	Дата, время изменения
1	Yes	Memorial Hospital	13	Metric	24-мар-2020 09:35:01
2	Yes	St. Elsewhere	9	English	02-май-2011 21:24:04
3	Yes	General Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:20
4	Yes	The Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:31
7	Yes	Test Site			
10	Yes	Research Site			

Свойства сайта (Исследовательский сайт)

Общие настройки

- Общие параметры
 - Функции для опытных пользо
 - Титульная страница факса
 - Параметры электронной поч
 - Параметры типа теста
 - E 14
- Параметры больницы информ
 - Общие параметры
 - Правила слияния
 - Запрос данных о госпитализа
- Параметры модуля редактиров
 - Общие параметры
 - Режим просмотра медиан
 - Режим просмотра необработ

Ид. код сайта: 10

Имя сайта: Research Site

Число символов в ид. коде пациента: 9

Число символов в номере заказа: 6

Единицы измерения: Metric

Программируемый пользователем заг...

Группа ид. кода пациента:

Обязательные поля

- ☐ Дополнительный ид. код пациента
- ☐ Номер заказа
- ☐ Номер посещения

Несоответствие полей


- ☒ Включена функция выявления несовпадения даты
- ☒ Разрешено не указывать фамилию

Вход для доступа

- ☒ Вносить в журнал просмотры записей о пациентах
- ☒ Вносить в журнал поиски записей о пациентах

ОК Закреть Применить

Программный ключ активации объединения баз данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

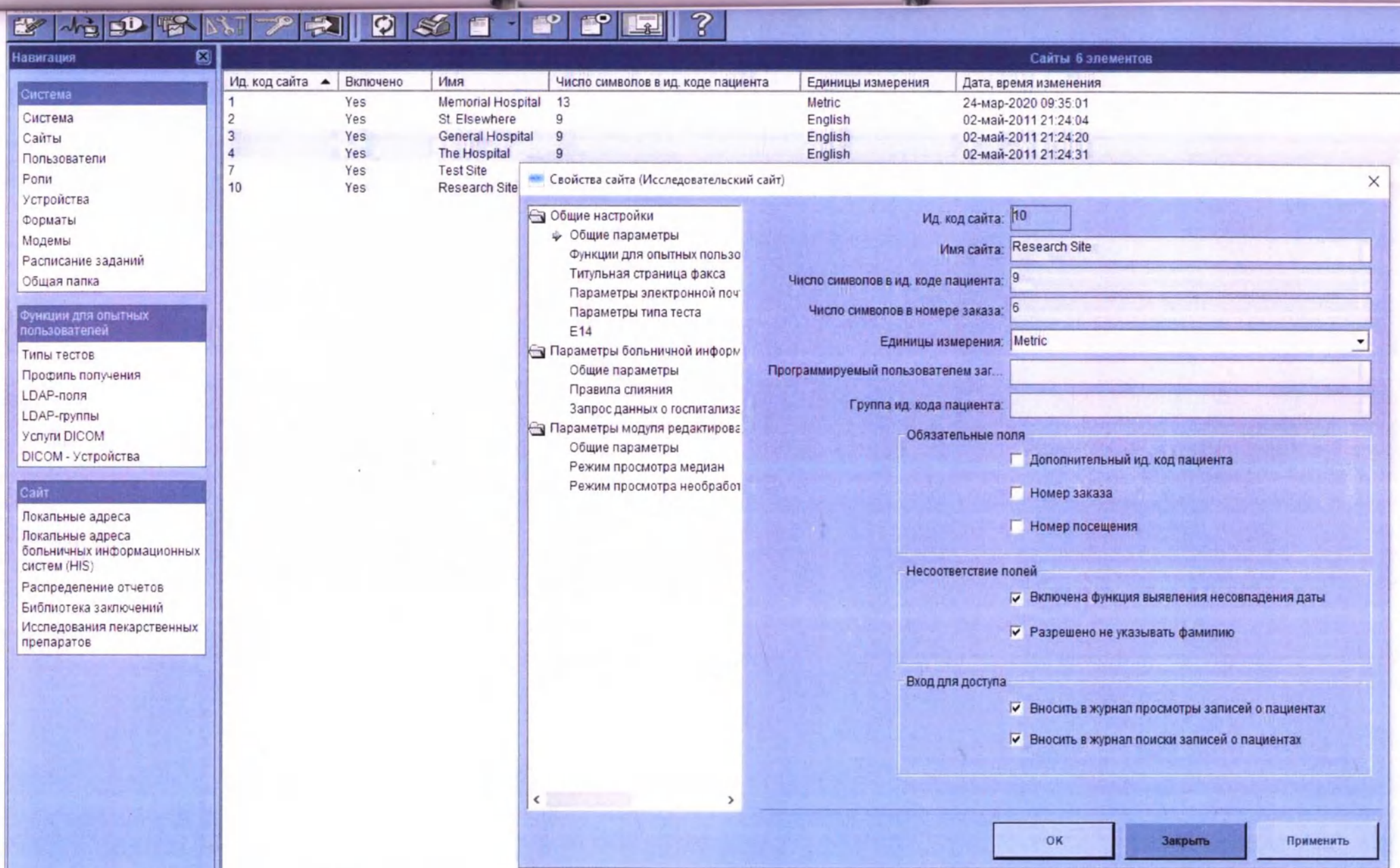

Программный ключ активации объединения данных на сервере на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Сайты 6 элементов

Ид. код сайта	Включено	Имя	Число символов в ид. коде пациента	Единицы измерения	Дата, время изменения
1	Yes	Memorial Hospital	13	Metric	24-мар-2020 09:35:01
2	Yes	St. Elsewhere	9	English	02-май-2011 21:24:04
3	Yes	General Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:20
4	Yes	The Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:31
7	Yes	Test Site			
10	Yes	Research Site			

Свойства сайта (Исследовательский сайт)

Общие настройки

- Общие параметры
 - Функции для опытных пользо
 - Титульная страница факса
 - Параметры электронной поч
 - Параметры типа теста
 - E14
- Параметры больницы информ
 - Общие параметры
 - Правила слияния
 - Запрос данных о госпитализа
- Параметры модуля редактирова
 - Общие параметры
 - Режим просмотра медиан
 - Режим просмотра необрабо

Ид. код сайта: 10

Имя сайта: Research Site

Число символов в ид. коде пациента: 9

Число символов в номере заказа: 6

Единицы измерения: Metric

Программируемый пользователем заг...

Группа ид. кода пациента:

Обязательные поля

- ☐ Дополнительный ид. код пациента
- ☐ Номер заказа
- ☐ Номер посещения

Несоответствие полей

- ☒ Включена функция выявления несовпадения даты
- ☒ Разрешено не указывать фамилию

Вход для доступа

- ☒ Вносить в журнал просмотры записей о пациентах
- ☒ Вносить в журнал поиски записей о пациентах

OK Закреть Применить

Программный ключ активации экспорта данных на дополнительный сервер на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Сайты 6 элементов

Ид. код сайта	Включено	Имя	Число символов в ид. коде пациента	Единицы измерения	Дата, время изменения
1	Yes	Memorial Hospital	13	Metric	24-мар-2020 09:35:01
2	Yes	St. Elsewhere	9	English	02-май-2011 21:24:04
3	Yes	General Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:20
4	Yes	The Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:31
7	Yes	Test Site			
10	Yes	Research Site			

Свойства сайта (Исследовательский сайт)

Общие настройки

- Общие параметры
 - Функции для опытных пользо
 - Титульная страница факса
 - Параметры электронной поч
 - Параметры типа теста
 - E14
- Параметры больницы информ
 - Общие параметры
 - Правила слияния
 - Запрос данных о госпитализа
- Параметры модуля редактиров
 - Общие параметры
 - Режим просмотра медиан
 - Режим просмотра необрабо

Ид. код сайта: 10

Имя сайта: Research Site

Число символов в ид. коде пациента: 9

Число символов в номере заказа: 6

Единицы измерения: Metric

Программируемый пользователем заг...

Группа ид. кода пациента:

Обязательные поля

- ☐ Дополнительный ид. код пациента
- ☐ Номер заказа
- ☐ Номер посещения

Несоответствие полей

- ☒ Включена функция выявления несовпадения даты
- ☒ Разрешено не указывать фамилию

Вход для доступа

- ☒ Вносить в журнал просмотра записей о пациентах
- ☒ Вносить в журнал поиска записей о пациентах

ОК Закреть Применить

Программный ключ активации хранения малых объемов данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Сайты 6 элементов

Ид. код сайта	Включено	Имя	Число символов в ид. коде пациента	Единицы измерения	Дата, время изменения
1	Yes	Memorial Hospital	13	Metric	24-мар-2020 09:35:01
2	Yes	St. Elsewhere	9	English	02-май-2011 21:24:04
3	Yes	General Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:20
4	Yes	The Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:31
7	Yes	Test Site			
10	Yes	Research Site			

Свойства сайта (Исследовательский сайт)

Общие настройки

- Общие параметры
 - Функции для опытных пользо
 - Титульная страница факса
 - Параметры электронной поч
 - Параметры типа теста
 - E14
- Параметры больницы информ
 - Общие параметры
 - Правила слияния
 - Запрос данных о госпитализа
- Параметры модуля редактирове
 - Общие параметры
 - Режим просмотра медиан
 - Режим просмотра необработ

Ид. код сайта: 10

Имя сайта: Research Site

Число символов в ид. коде пациента: 9

Число символов в номере заказа: 6

Единицы измерения: Metric

Программируемый пользователем заг...

Группа ид. кода пациента:

Обязательные поля

- ☐ Дополнительный ид. код пациента
- ☐ Номер заказа
- ☐ Номер посещения

Несоответствие полей


- ☒ Включена функция выявления несовпадения даты
- ☒ Разрешено не указывать фамилию

Вход для доступа


- ☒ Вносить в журнал просмотры записей о пациентах
- ☒ Вносить в журнал поиски записей о пациентах

OK Закрыть Применить

Программный ключ активации хранения средних объемов данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

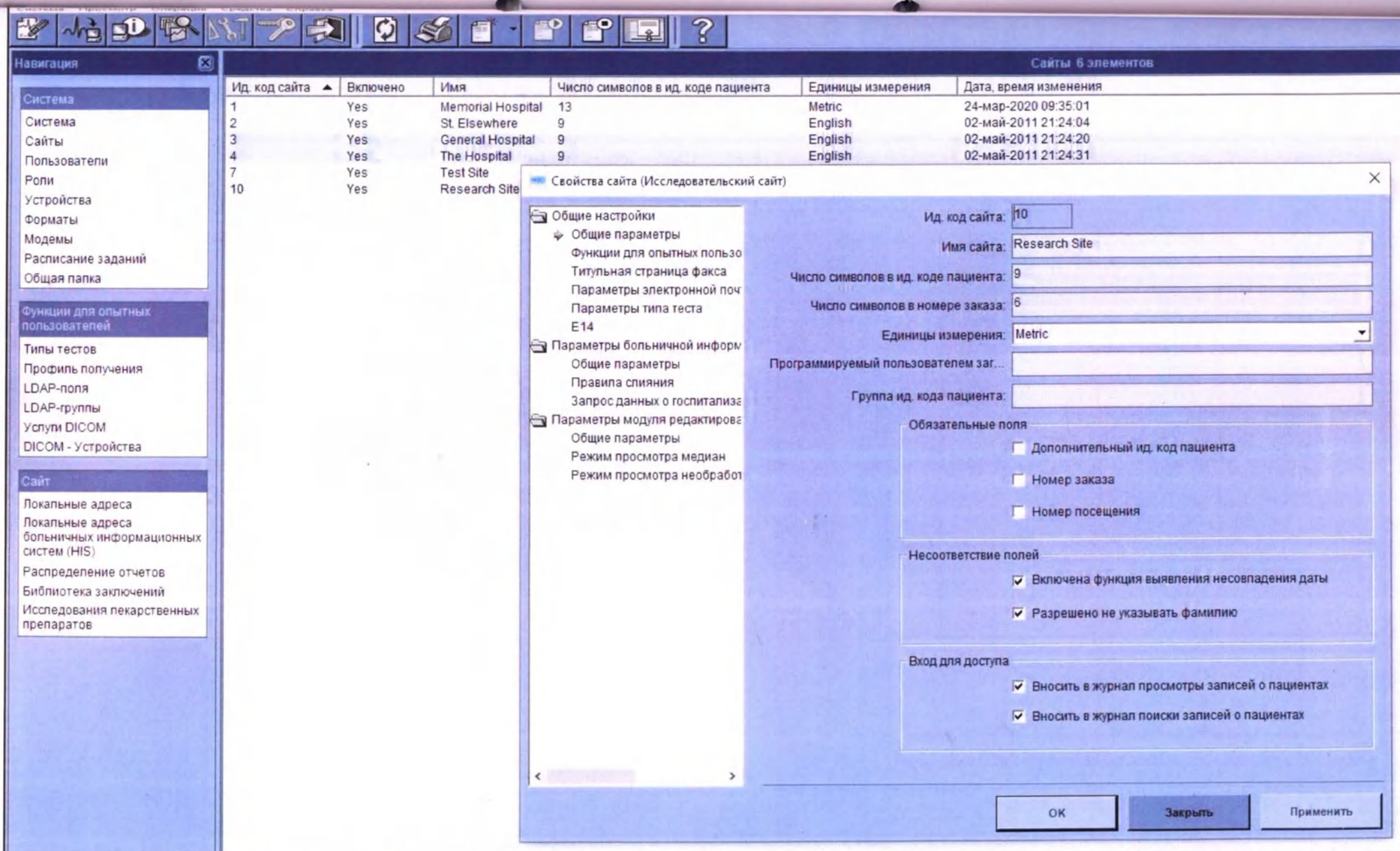

Программный ключ активации хранения больших объемов данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

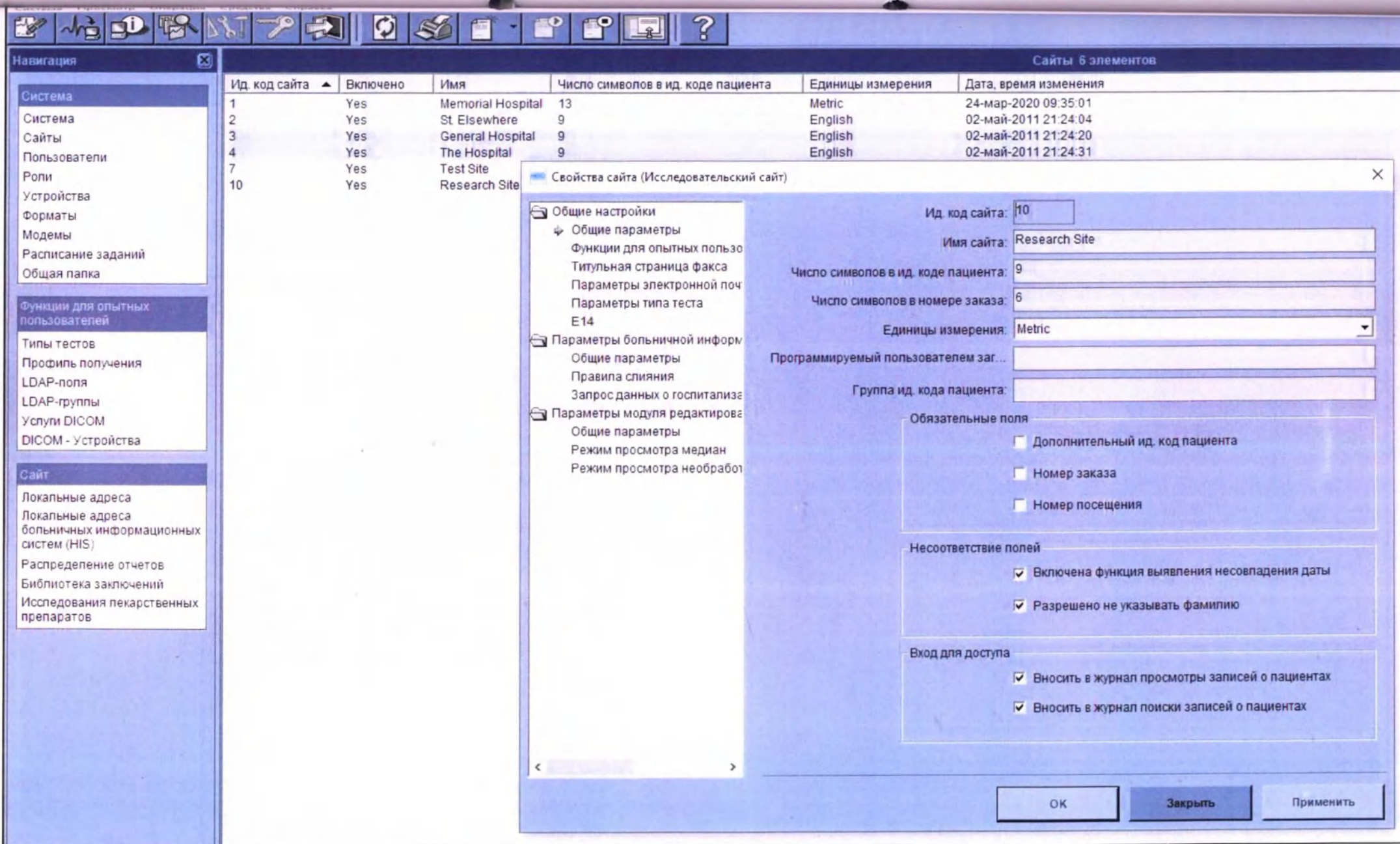

Программный ключ активации хранения очень больших объемов данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Сайты 6 элементов

Ид. код сайта	Включено	Имя	Число символов в ид. коде пациента	Единицы измерения	Дата, время изменения
1	Yes	Memorial Hospital	13	Metric	24-мар-2020 09:35:01
2	Yes	St. Elsewhere	9	English	02-май-2011 21:24:04
3	Yes	General Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:20
4	Yes	The Hospital	9	English	02-май-2011 21:24:31
7	Yes	Test Site			
10	Yes	Research Site			

Свойства сайта (Исследовательский сайт)

Ид. код сайта: 10

Имя сайта: Research Site

Число символов в ид. коде пациента: 9

Число символов в номере заказа: 6

Единицы измерения: Metric

Программируемый пользователем заг...

Группа ид. кода пациента:

Обязательные поля

☐ Дополнительный ид. код пациента

☐ Номер заказа

☐ Номер посещения

Несоответствие полей

☒ Включена функция выявления несовпадения даты

☒ Разрешено не указывать фамилию

Вход для доступа

☒ Вносить в журнал просмотры записей о пациентах

☒ Вносить в журнал поиски записей о пациентах

Общие настройки

- Общие параметры
 - Функции для опытных пользо
 - Титульная страница факса
 - Параметры электронной поч
 - Параметры типа теста
 - E14
- Параметры больницы информ
 - Общие параметры
 - Правила слияния
 - Запрос данных о госпитализа
- Параметры модуля редактирове
 - Общие параметры
 - Режим просмотра медиан
 - Режим просмотра необрабо

ОК Закреть Применить

Программный ключ активации изменения принципа идентификации на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Welcome to the MUSE Setup Wizard

The installer will guide you through the steps required to modify MUSE on your computer.

Click "Next" to continue.

WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

NOTE: When upgrading, it is important to uninstall all peripherals associated with previous versions of MUSE from Uninstall Programs (MUSE CV Web x.x, MUSE-MARS formatter, MUSEAPI, MWCLBasicInstaller, and MOCKRA Compatibility) as well as websites included in IIS (CV Web Configurator, MUSE CV Web x.x, MuseWebCompatibilityLayer, and Centricity CV Web).

NX R2

Cancel

< Back

Next >

Общие параметры

Дата, время создания: 17-окт-2019 14:27:01

Дата, время изменения: 17-окт-2019 14:27:01

Имя локального адреса больницы
информационной системы (HIS): HIS LOCATION

Локальный адрес системы MUSE: 1 - ECG


Полное имя локального адреса системы
MUSE: ECG Department

OK

Закреть

Применить

Программный ключ активации соотнесения локальных адресов больничных информационных систем с локальными адресами системы MUSE на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

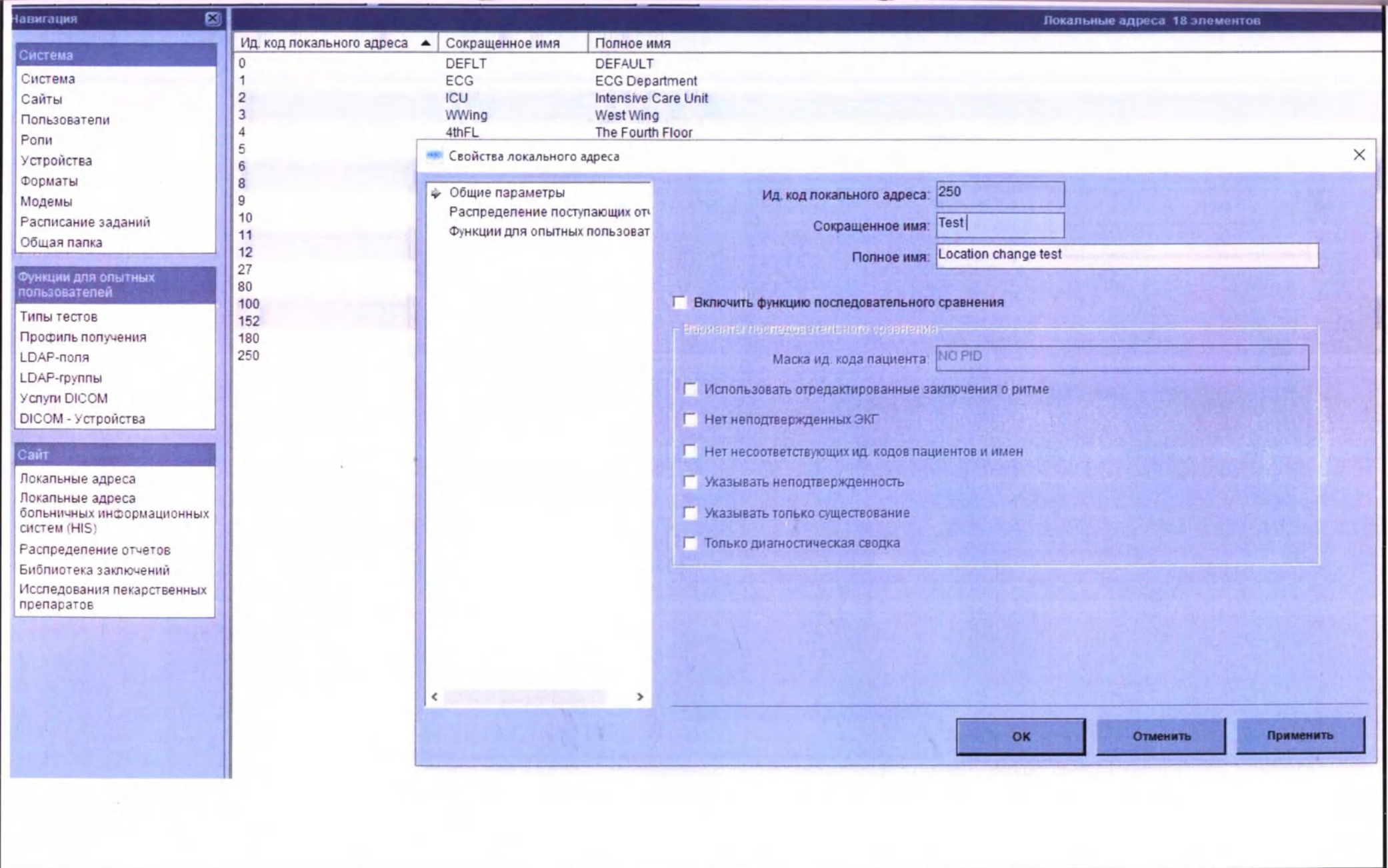

Программный модуль тестирования MUSE.

Общие параметры

Дата, время создания: 08-ноя-2020 15:46:02

Дата, время изменения: 08-ноя-2020 15:46:02

Имя локального адреса больничной
информационной системы (HIS):

TEST HL7

Локальный адрес системы MUSE:

0 - DEFLT

Полное имя локального адреса системы
MUSE:

0 - DEFLT

1 - ECG

2 - ICU

3 - WWing

4 - 4thFL

5 - ED

6 - CCU

8 - Echo

OK

Отменить

Применить

Программный модуль тестирования протокола HL7.

	Модуль редактирования	нормальная	Устройство
Включить запрос данных из ADT:	☒	☒	☒
Перед запросом проверять базу данных ADT MUSE:	☒	☒	☒
Время ожидания запроса данных госпитализации, выписки и переводов пациента (5-255 с):	5	5	5

Общие сведения

Число букв, которое должно совпадать в фамилии:

☐ Требовать информацию ADT для подтверждения и последовательного сравнения

Свойства подключения

Сервер:

Порт связи:

Программный ключ активации передачи ADT данных из/в госпитальную информационную систему на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие настройки

- Общие параметры
- Функции для опытных пользо
- Титульная страница факса
- Параметры электронной поч
- Параметры типа теста
- E14

Параметры больничной информ

- Общие параметры
- Правила слияния
- Запрос данных о госпитализа

Параметры модуля редактирова

- Общие параметры
- Режим просмотра медиан
- Режим просмотра необработ

Настройки интерфейса

- ☒ Сайт имеет интерфейс с системой регистрации госпитализации, выписки и перевода пациентов
 - ☐ Использовать номер посещения вместо идент. кода пациента
 - ☐ Никаких записей ADT для проверки соответствия пациента не разрешено
 - ☒ На узле имеется интерфейс заказов
 - ☐ Допустить отмену заказов вручную
 - ☐ Сайт имеет интерфейс запросов системы регистрации госпитализации, выписки и перевода пациентов
- ☐ Сайт имеет интерфейс выставления счетов
 - ☐ Выставление счетов посредством финансовой операции

Настройки управления данными HIS

Число дней, в течение которых посещения сохраняются после получения выписки: 7

Число дней, в течение которых сохраняются выполненные заказы: 14

Число дней, когда откр. или незаверш. заказы сохраняются после даты заказа: 14

Параметры загрузки заказов

Часов до текущего времени: 24

Часов после текущего времени: 24

Максимальный срок в месяцах после посещения: 3

ОК Отменить Применить

Программный ключ активации получения заказов в госпитальную информационную систему на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие параметры
Цвета
Шрифты
Формы
 Варианты
 Шрифты
 Количество страниц
HL7
➔ **Только для тестов с нагрузкой**
Приложения
Подробности

☒ Сводка по ступеням нагрузки
☒ Тренды CASE-16 (все отведения)
☒ Отчет о графике зависимости ST/ЧСС
☒ Холленберговский отчет
☒ Тренды MAX-1 (все отведения)
☒ Петли ST-ЧСС
☒ Отчет о трендах и медианах
☒ Отчет с выбранными медианами
☒ Использовать пиковую медиану
☒ Информация о наклоне ST
☒ Короткие метки

Уровень усиления: Cart Settings
Скорость развертки волны: Cart Settings
Примеры кардиоциклов: None
Табличный сводный отчет: Yes
Тренды (3 отведения): No
Первая страница фрагментов: 1
Последняя страница фрагментов: 255
Шаблон отчета: Report1

☐ Задать последовательность отведений Cabrera

OK Отменить Применить

Программный ключ активации передачи текстового заключения ЭКГ покоя, стресс-ЭКГ, холтеровского мониторингирования ЭКГ в электронную карту пациента на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие параметры
Цвета
Шрифты
Формы
 Варианты
 Шрифты
 Количество страниц
HL7
➔ Только для тестов с нагрузкой
Приложения
Подробности

☒ Сводка по ступеням нагрузки
☒ Тренды CASE-16 (все отведения)
☒ Отчет о графике зависимости ST/ЧСС
☒ Холленберговский отчет
☒ Тренды MAX-1 (все отведения)
☒ Петли ST-ЧСС
☒ Отчет о трендах и медианах
☒ Отчет с выбранными медианами
☒ Использовать пиковую медиану
☒ Информация о наклоне ST
☒ Короткие метки

Уровень усиления: Cart Settings
Скорость развертки волны: Cart Settings
Примеры кардиоциклов: All Leads
Табличный сводный отчет: Yes
Тренды (3 отведения): No
Первая страница фрагментов: 1
Последняя страница фрагментов: 255
Шаблон отчета: Report1

☐ Задать последовательность отведений Cabrera

OK Отменить Применить

Программный ключ активации передачи кривых ЭКГ покоя, стресс-ЭКГ, холтеровского мониторирования ЭКГ в электронную карту пациента на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

	Модуль редактирова ния	нормальная	Устройство
Включить запрос данных из ADT:	☒	☒	☒
Перед запросом проверять базу данных ADT MUSE:	☒	☒	☒
Время ожидания запроса данных госпитализации, выписки и переводов пациента (5-255 с):	5	5	5

Общие сведения

Число букв, которое должно совпадать в фамилии:

☐ Требовать информацию ADT для подтверждения и
последовательного сравнения

Свойства подключения

Сервер:

Порт связи:

Программный ключ активации запроса ADT данных из госпитальной информационной системы на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие настройки

Общие параметры

Функции для опытных пользо

Титульная страница факса

Параметры электронной поч

Параметры типа теста

E14

Параметры больничной информ

Общие параметры

Правила слияния

Запрос данных о госпитализа

Параметры модуля редактирова

Общие параметры

Режим просмотра медиан

Режим просмотра необработ

Настройки интерфейса

☐ Сайт имеет интерфейс с системой регистрации госпитализации, выписки и перевода пациентов

☐ Использовать номер посещения вместо идент. кода пациента

☐ Никаких записей ADT для проверки соответствия пациента не разрешено

☐ На узле имеется интерфейс заказов

☐ Допустить отмену заказов вручную

☐ Сайт имеет интерфейс запросов системы регистрации госпитализации, выписки и перевода пациентов

☒ Сайт имеет интерфейс выставления счетов

☐ Выставление счетов посредством финансовой операции

Настройки управления данными HIS

Число дней, в течение которых посещения сохраняются после получения выписки: 7

Число дней, в течение которых сохраняются выполненные заказы: 14

Число дней, когда откр. или незаверш. заказы сохраняются после даты заказа: 14

Параметры загрузки заказов

Часов до текущего времени: 24

Часов после текущего времени: 24

Максимальный срок в месяцах после посещения: 3

OK

Отменить

Применить

Программный ключ активации передачи финансовой информации на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2
Руководство пользователя веб-клиента
2302021-262-3



2302021-262
Редакция 3
Russian | Русский
© 2022, 2023 General Electric
Company
Все права защищены.

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.

Руководство по эксплуатации Web-интерфейса.

Свойства профиля получения

Общие параметры

Имя: Mortara stress

Тип теста: Exercise Testing

Сайт: Memorial Hospital

Адрес: Stress Lab

Набор личных параметров:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FieldParserProfile xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
  <FileNameProfile />
  <MetaDataProfile />
  <DocumentProfile>
    <DocumentMapping Type="3">
      <Items>
        <Item ID="12007" Start="3" Row="2" MaxLength="16" PageNum="1" D
      </Items>
    </DocumentMapping>
    <DocumentMapping Type="4">
      <Items>
        <Item ID="11001" RegExp="ID:\s{0,4}(?&lt;value&gt;[d]{0,16})" PageNu
        <Item ID="12029" RegExp="Second ID:\s{0,4}(?&lt;value&gt;[d]{3}\s[d]
        <Item ID="11003" RegExp="Last Name:\s{0,4}(?&lt;value&gt;.{0,40})" F
        <Item ID="11004" RegExp="First Name:\s{0,4}(?&lt;value&gt;[w\s]{0,4
```

Импорт

OK Закреть Применить

Программный ключ активации получения данных от устройств сторонних производителей на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Настройки MWL
Настройки соединения DICOM

Пользовательская служба Modality Worklist

Название AE: MUSEGW

Сайт, заданный по умолчанию: 1

☐ Запрос только на заданном по умолчанию сайте

Конфиг. провайдера раб. списка исследований

Название AE: DVTK_MW_SCP

IP-адрес: 127.0.0.1

Порт: 107

Запрос по умолчанию

Интервал запросов (в мин.): 1

Days in the Future: 5

Days in the Past: 5

Location Parsing

☐ Scheduled Station AE Title:

☒ Current Patient Location

Separator:

Location Section:

Команда Echo DICOM

OKЗаккрытьПрименить

Программный ключ активации обмена данными в формате DICOM на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2

Руководство по нормативным требованиям и технике безопасности
2302021-263-3



2302021-263
Редакция 3
Russian | Русский
© 2022, 2023 General Electric
Company
Все права защищены.

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.

Руководство по регулированию и технике безопасности.

MUSE™ NX

Кардиологическая информационная система

R2

Руководство администратора

2302021-265-3



2302021-265

Редакция 3

Russian | Русский

© 2022, 2023 General Electric

Company

Все права защищены.

Общая документация пользователя. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение и/или распространение запрещены.

Руководство по интеграции программного обеспечения в госпитальную информационную систему.

Навигация

Система

Система

Сайты

Пользователи

Роли

Устройства

Форматы

Модемы

Расписание заданий

Общая папка

Функции для опытных пользователей

Типы тестов

Профиль получения

LDAP-поля

LDAP-группы

Услуги DICOM

DICOM - Устройства

Сайт

Локальные адреса

Локальные адреса
больничных информационных
систем (HIS)

Распределение отчетов

Библиотека заключений

Исследования лекарственных
препаратов

Ид. код устройства ▲	Тип	Имя	Назначение	Пакетное устройство (только для HL7)
14	System	Web Print		
15	System	Web View		
300	Folder	PDF Export	C:\PDFExport	
301	Folder	XML Export	C:\XMLExport	
302	E-Mail Address	Dr. Smith's email	jsmith@localhost	
303	Folder	PostScript Output	C:\PDFexport	
304	Folder	HTML Output	c:\pdfexport	
305	FAX Machine	Dr. Smith's Fax	12345	
306	FAX Machine	Dr. Johnson's Fax	54321	
307	DICOM IOD	DICOMEXP	127.0.0.1	
1307	Folder	ExportHiltop	C:\HTExport	
1308	Folder	MUSE Printed Reports	C:\muse\MUSEPrint	
1309	Folder	HTExport	\\Wm-dcar-demo\ht	

Обновить

Печать списка

Новый >

Стереть

Свойства

Принтер PostScript

Принтер PCL

Телефакс

Электронный почтовый адрес

Папка

Папка протокола передачи файлов (FTP)

CSI

CSI-Выс. разр.

HL7

DCP

DICOM IOD

DICOM PDF

Модуль лицензии программного обеспечения для интеграции с госпитальной информационной системой на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Свойства общей папки

Общие параметры

Запись: c:\PDFimport\Mortara

Пример: \\Server\Share или C:\Folder

Фильтр имени файла: *.pdf

Имя профиля: Mortara stress

- ABP Data
- PFT Data
- MSR Data
- Getemed
- Mortara stress**
- STRESS
- CardioSoft Resting
- ErgoSpirometry

OK Закреть Применить

Дополнительный программный модуль для получения данных с устройств сторонних производителей на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Общие параметры

Имя: ZyMed Holter Data

Тип теста: Holter

Сайт: Memorial Hospital

Адрес: Holter Scanning

Набор личных параметров:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FieldParserProfile xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FileNameProfile>
    <FileNameMapping Type="2" Separator="#">
      <Items>
        <Item ID="11001" Description="Patient ID" DateTimeFormat="" />
        <Item ID="11003" Description="Last Name" DateTimeFormat="" />
        <Item ID="11004" Description="First Name" DateTimeFormat="" />
        <Item ID="11008" Description="Date of Birth" DateTimeFormat="yyyy_MM-dd" />
        <Item ID="12007" Description="Acquisition Date Time" DateTimeFormat="yyyy-MM-dd HH:mm:ss" />
        <Item ID="12035" Description="Acquisition Time" DateTimeFormat="HH:mm:ss" />
      </Items>
    </FileNameMapping>
  </FileNameProfile>
  <MetaDataProfile />
</DocumentProfile />
```

Импорт

ОК

Закреть

Применить

Программный модуль или код активации для конвертации данных с устройств сторонних производителей на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Система

Система

Сайты

Пользователи

Роли

Устройства

Форматы

Модемы

Расписание заданий

Общая папка

Функции для опытных пользователей

Типы тестов

Профиль получения

LDAP-поля

LDAP-группы

Услуги DICOM

DICOM - Устройства

Сайт

Локальные адреса

Локальные адреса больничных информационных систем (HIS)

Распределение отчетов

Библиотека заключений

Исследования лекарственных препаратов

Ид. код устройства ▲	Тип	Имя	Назначение	Пакетное устройство (только для HL7)
14	System	Web Print		
15	System	Web View		
300	Folder	PDF Export	C:\PDFExport	
301	Folder	XML Export	C:\XMLEXP	
302	Email Address	Dr. Smith's email	jsmith@localhost	
303	Folder	PostScript Output	C:\PDFExport	
304	Folder	HTML Output	c:\pdfexport	
305	FAX Machine	Dr. Smith's Fax	12345	
306	FAX Machine	Dr. Johnson's Fax	54321	
307	DICOM IOD	DICOMEXP	127.0.0.1	
1307	Folder	ExportHiltop	C:\HTExport	
1308	Folder	MUSE Printed Reports	C:\muse\MUSEPrint	
1309	Folder	HTExport	\\Wm-dcar-demo\ht	

Обновить

Печать списка

Новый >

Стереть

Свойства

Принтер PostScript

Принтер PCL

Телефакс

Электронный почтовый адрес

Папка

Папка протокола передачи файлов (FTP)

CSI

CSI-Выс. разр.

HL7

DCP

DICOM IOD

DICOM PDF

Программный модуль или код активации для обновления программного обеспечения для интеграции с госпитальной информационной системой на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Welcome to the MUSE Setup Wizard

The installer will guide you through the steps required to modify MUSE on your computer.

Click "Next" to continue.

WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

NOTE: When upgrading, it is important to uninstall all peripherals associated with previous versions of MUSE from Uninstall Programs (MUSE CV Web x.x, MUSE-MARS formatter, MUSEAPI, MWCLBasicInstaller, and MOCKRA Compatibility) as well as websites included in IIS (CV Web Configurator, MUSE CV Web x.x, MuseWebCompatibilityLayer, and Centricity CV Web).

NX R2

Cancel

< Back

Next >

Программный модуль или код активации для обновления клиентских станций на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

Навигация

Система

Система

Сайты

Пользователи

Роли

Устройства

Форматы

Модемы

Расписание заданий

Общая панель

Функции для опытных пользователей

Типы тестов

Профиль получения

LDAP-поля

LDAP-группы

Услуги DICOM

DICOM - Устройства

Сайт

Локальные адреса

Локальные адреса
больничных информационных
систем (HIS)

Распределение отчетов

Библиотека заключений

Исследования лекарственных
препаратов

Модемы

Ид. код модема ▲	Тип	Компьютер	Порт	Битов в секунду	IP-адрес или имя хоста	Сетевой порт
1	CSI Network	MUSE9demo			192.168.0.71	3001
3	CSI Network	MUSE9demo			192.168.0.72	3001

Обновить

Печать списка

Новый >

Перезапустить модем

Стереть

Свойства

Факс-модем

Модем кардиологической системы CSI

Прямая связь с кардиологической системой CSI

Сеть CSI



Название изделия: MUSE™
Выпуск продукта: NX
Версия ПО:

UDI

SN



1

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226 USA

Информация о системе

Закреть

Маркировка медицинского изделия.

Название продукта: MUSE™

Выпуск продукта: NX

Версия ПО

SN

UDI



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226 USA

EC REP

CH REP

1

2

©General Electric Company, 2013-2024. Все права защищены.

Сведения о лицензии на использование стороннего ПО и об авторских правах содержатся в папке Licenses (Лицензии) в каталоге установки сервера.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 66 листов

Директор департамента регистрации
и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



Харитонова Харитонова А.П.