

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый
по ТУ 32.50.13 – 005– 07511117 – 2024**



ЖГУТ-ТУРНИКЕТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
по ТУ 32.50.13 – 005– 07511117 – 2024

Предназначен для экстренного гемостазирования сильного артериального кровотечения верхних и нижних конечностей пациента.

Способ применения: 1. Проверить целостность индивидуальной упаковки. Вскрыть упаковку и извлечь жгут-турникет. 2. Жгут-турникет необходимо наложить выше места кровотечения. После выбора положения жгута сначала следует проложить ткань в этом месте. 3. Ремень жгута следует вытянуть через пряжку до упора, закрепляя ее свободный кончик с помощью черной контакт-ленты (липучки). 4. Рычаг для утяжки необходимо закручивать до остановки кровотечения и зафиксировать зажимом. После этого зажим застегнуть белой контакт-лентой (липучкой). 5. Запишите время наложения жгута-турникета на белой контакт-ленте (липучке). Время наложения – не более 60 минут. 6. После наложения жгута конечность следует иммобилизовать (обездвижить) и термоизолировать (укутать) доступными способами. Пациенты с массивным кровотечением должны быть отправлены в больницу как можно скорее после наложения жгута-турникета. 7. Рекомендуется расслабить жгут-турникет на полминуты через полчаса, а затем снова затянуть. При повторном закреплении положение следует немного переместить вверх от предыдущего наложения. 8. Если максимальное время наложения жгута-турникета истекло, а медицинская помощь недоступна, следует сделать следующее: а) осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута; б) ослабить жгут на 10-15 минут; в) по возможности выполнить лёгкий массаж конечности, на которую был наложен жгут; г) наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения; д) максимальное время повторного наложения – не более 20 минут. 9. Утилизировать использованное изделие в контейнер для медицинских отходов класса Б. **Время наложения жгута не должно превышать 60 минут в теплое время года и 30 минут в холодное.**

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! НЕСТЕРИЛЬНО!



03.2024



03.2029

Партия № 0001



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uuppo.ru

РУ №РЗН 2024/22428 от 18.04.2024

Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый в индивидуальной упаковке с маркировкой

УТВЕРЖДАЮ
Временный генеральный директор
АО «У-У ППО»
В.В.Лучников
10 октября 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие
Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый по ТУ
32.50.13 – 005– 07511117 – 2024



Общий вид МИ «Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый
по ТУ 32.50.13 – 005– 07511117 – 2024»

УТВЕРЖДАЮ
Временный генеральный директор
АО «У-У ПЮ»
В.В.Лучников
октября 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие
Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый по ТУ
32.50.13 – 005– 07511117 – 2024

Инструкция по применению МИ «Жгут-турникет кровоостанавливающий
одноразовый по ТУ 32.50.13 – 005– 07511117 – 2024»



Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый



**ЖГУТ-ТУРНИКЕТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ**

по ТУ 32.50.13 - 005- 07511117 - 2024

Количество изделий в упаковке: 15 штук

Партия № 0001

Дата изготовления: 03.2024

Годен до: 03.2029

Масса брутто не более 3,0 кг

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C



Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C.



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

67003-4, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-
Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uupro.ru

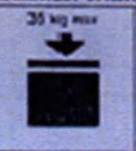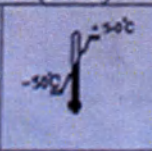

РУ № РЗН 2024/22428 от 18.04.2024

Транспортная упаковка медицинского изделия

В настоящем документе
Простуровано и пронумеровано

на 6 (шесть)

листоу (листоу)

Временный генеральный
директор АО «У-У ППО»

В.В. Луииков



Проекты маркировки медицинского изделия

**Жгут-турникет кровоостанавливающий одноразовый по ТУ
32.50.13 – 005– 07511117 – 2024**

Макет маркировки потребительской упаковки



ЖГУТ-ТУРНИКЕТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ по ТУ 32.50.13 – 005– 07511117 – 2024


Предназначен для экстренного гемостазирования сильного артериального кровотечения верхних и нижних конечностей пациента.

Способ применения: 1. Проверить целостность индивидуальной упаковки. Вскрыть упаковку и извлечь жгут-турникет. 2. Жгут-турникет необходимо наложить выше места кровотечения. После выбора положения жгута сначала следует проложить ткань в этом месте. 3. Ремень жгута следует вытянуть через пряжку до упора, закрепляя ее свободный кончик с помощью черной контакт-ленты (липучки). 4. Рычаг для утяжки необходимо закручивать до остановки кровотечения и зафиксировать зажимом. После этого зажим застегнуть белой контакт-лентой (липучкой). 5. Запишите время наложения жгута-турникета на белой контакт-ленте (липучке). Время наложения – не более 60 минут. 6. После наложения жгута конечность следует иммобилизовать (обездвижить) и термоизолировать (укутать) доступными способами. Пациенты с массивным кровотечением должны быть отправлены в больницу как можно скорее после наложения жгута-турникета. 7. Рекомендуется расслабить жгут-турникет на полминуты через полчаса, а затем снова затянуть. При повторном закреплении положение следует немного переместить вверх от предыдущего наложения. 8. Если максимальное время наложения жгута-турникета истекло, а медицинская помощь недоступна, следует сделать следующее: а) осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута; б) ослабить жгут на 10-15 минут; в) по возможности выполнить лёгкий массаж конечности, на которую был наложен жгут; г) наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения; д) максимальное время повторного наложения – не более 20 минут. 9. Утилизировать использованное изделие в контейнер для медицинских отходов класса Б.

Время наложения жгута не должно превышать 60 минут в теплое время года и 30 минут в холодное.

Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от + 5°C до + 40°C

ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО! НЕСТЕРИЛЬНО!

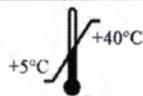

XX.XXXX



XX.XXXX

Партия № XXXX



АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uuppo.ru

РУ № _____

Макет маркировки транспортной упаковки



**ЖГУТ-ТУРНИКЕТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ**

по ТУ 32.50.13 – 005– 07511117 – 2024

Количество изделий в упаковке: XX штук

Партия № XXXX

Дата изготовления: XX.XXXX

Годен до: XX.XXXX

Масса брутто не более XX,0 кг


Хранить в сухом помещении вдали от отопительных приборов, взрывоопасных и горючих материалов при температуре от +5°C до +40°C
Транспортировать при температуре от -50 до +50



**АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»**

670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-
Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uuppo.ru

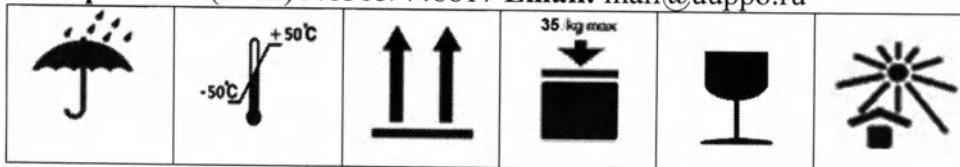

РУ № _____

В настоящем документе
Прошнуровано и пронумеровано

на 3 (трех)

листом (листов

Временный генеральный
директор АО «У-У ППО»

В.В. Луныков

