

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会

中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No.

243208B0/000762

兹证明：在所附文件上的淮安市天一医疗器械有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of Huai'an City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized

Signature:

Zhao Weilu

日期: 2024年10月22日

(Date: Oct. 22, 2024)

证明于 网站 Website for verifying the certificate: <http://www.rzcepit.com/validate.html>

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

Approved by Huaian City Tianyi
Medical Instrument Co., Ltd.
General Manager



Huang Ying

2024.10.22

Инструкция по применению на медицинское изделие
МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ИНТРАЛОН®

(Instruction for Use on a Medical Device
DISPOSABLE NON-STERILE URINARY COLLECTION BAG
ИНТРАЛОН®)

Версия документа	Описание	Дата
1.1	Начальная версия	02.07.2024
1.2	Версия: 1.2	2024.10.22

1475

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	5
2	НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	14
4	ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ.....	73
5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	81
6	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	129
7	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	130
8	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	140
9	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	141
10	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	142
11	СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ.....	143
12	СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ	143
13	СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	143
14	СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ.....	143
15	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.....	144
16	ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	145
17	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	147
18	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	148
19	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	149
20	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	151
21	ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ.....	153

Настоящая инструкция по применению распространяется на Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® (далее – мочеприемник) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках мочеприемника, необходимые для правильной его эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения мочеприемника, отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

Настоящую инструкцию по применению необходимо хранить вместе с изделием или недалеко от него для того, чтобы в случае необходимости Вы могли воспользоваться данной инструкцией.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования мочеприемника, необходимо обращаться к изготовителю или к уполномоченному представителю в РФ.

Изготовитель или уполномоченный представитель в РФ не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием мочеприемника в целях, отличающихся от указанных в данной инструкции по применению.

Изготовитель:

Полное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Сокращенное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Адрес: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003,

Jiangsu, China (Китай)

Тел.: +86-15051399556 Факс: +86-517-83806511

E-mail: andy-jay@163.com

Уполномоченный представитель в РФ:

Акционерное общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда» (АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»)

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ

Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15

E-mail: info@mediteczt.ru

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению разработана в соответствии с требованиями национальных и международных нормативных документов (стандартов).

1.2 НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®

I. Варианты исполнения:

1. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
2. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
3. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
4. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
5. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
6. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
7. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
8. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
9. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
10. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
11. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
12. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
13. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
14. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
15. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
16. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.

17. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
18. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
19. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
20. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
21. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
22. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
23. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
24. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
25. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
26. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
27. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
28. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
29. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
30. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
31. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
32. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
33. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
34. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
35. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
36. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

- 2

57. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
58. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
59. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
60. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
61. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
62. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
63. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
64. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
65. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
66. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
67. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
68. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
69. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
70. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
71. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
72. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
73. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
74. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
75. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
76. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.

77. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
78. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
79. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
80. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
81. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
82. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
83. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
84. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
85. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
86. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
87. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
88. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
89. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
90. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
91. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
92. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
93. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
94. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
95. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
96. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
97. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным

117. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.

краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

139. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.

140. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.

141. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.

142. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.

143. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.

144. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

145. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.

146. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.

147. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.

148. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.

149. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.

150. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

II. Принадлежности:

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного – не более 50 шт.
- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Ремень для крепления мочеприемника носимого - не более 50 шт.
- Завязка для крепления мочеприемника носимого - не более 50 шт.

III. Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную тару).

1.3 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Полное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Сокращенное наименование: Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Адрес: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003,
Jiangsu, China (Китай)

Тел.: +86-15051399556 **Факс:** +86-517-83806511

E-mail: andy-jay@163.com

1.4 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.

Адрес: No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003,
Jiangsu, China

1.5 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

Акционерное общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда» (АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»)

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ

Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15

E-mail: info@mediteczt.ru

2 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® (далее – мочеприемник) предназначен для сбора мочи.

Мочеприемник может применяться в условиях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и домашних условиях.

2.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Недержание мочи (инконтиненция) – это непроизвольное мочеиспускание, которым в разных возрастных группах страдают от 15 до 40% взрослого населения. Недержание мочи является симптомом целого ряда заболеваний и состояний. Прежде всего это возрастные или возникшие в результате физиологических процессов и заболеваний нарушения функций органов мочеполовой системы. Причины развития недержания мочи различны для женщин и мужчин. Причиной женского недержания мочи могут быть ослабление мышц тазового дна и сфинктеров мочевого пузыря в результате тяжелых или частых родов, возрастных изменений, опущение или выпадение органов малого таза, гистерэктомия, климакс; мужского недержания – возрастные изменения простаты, аденома простаты, операции на предстательной железе. К общим причинам недержания можно отнести болезни мочеполовой системы (уретрит, цистит, заболевания почек), опухоли органов малого таза, последствия лучевой и химиотерапии, состояния после оперативных вмешательств на органах малого таза, в том числе связанные с повреждением нервов, выведением уро-, цисто-, нефростомы, травмы промежности, тяжелые физические нагрузки, психические расстройства (психозы, шизофрения), болезни нервной системы (рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, Паркинсона), прием некоторых лекарственных средств (нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов).

Необходимость обслуживания пациентов после операции и людей, страдающих недержанием мочи, обусловила необходимость разработки огромного количества видов и типов мочеприемников, которые могут использоваться в каждой конкретной ситуации.

Мочеприемники применяют в урологии и терапевтической практике для сбора мочи при катетеризации или недержании, а также для определения скорости суточного диуреза, при этом основным предназначением мочеприемника является облегчение условий жизнедеятельности, обеспечение наибольшего комфорта, а также поддержка здоровой психики пациента при различных заболеваниях и жизненных ситуациях.

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® представляет собой емкость для постоянного приема мочи у людей, у которых по разным причинам, временно или постоянно, невозможен нормальный акт мочеиспускания, и лежащих больных.

Мочеприемник относится к изделиям одноразового использования, предназначен для индивидуального применения.

В зависимости от мобильности (образа жизни) пациентов и особенностей использования мочеприемник может быть:

- прикроватный (сбор мочи, отводимой с помощью урологических катетеров, в т.ч. уропрезервативов, у взрослых пациентов / подростков с кратковременными или стойкими нарушениями функции мочевыделительной системы, находящихся в лежачем положении):

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- носимый (сбор мочи, отводимой с помощью урологических катетеров, в т.ч. уропрезервативов, у мобильных (подвижных) взрослых пациентов / подростков с кратковременными или стойкими нарушениями функции мочевыделительной системы):
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным

краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный (рисунок 1) (далее – мочеприемник прикроватный) крепится к урологическому катетеру или уропрезервативу, при помощи которого моча поступает в мешок мочеприемника прикроватного. В нижней части мешка мочеприемника прикроватного может быть размещен специальный сливной кран с клапаном определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной), используемый для удобного слива мочи. Объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней стороне мешка мочеприемника прикроватного, изготовленного из прозрачного или непрозрачного (белого) поливинилхлорида (в зависимости от варианта исполнения).

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника прикроватного, не предназначена для точного измерения количества жидкости.

В верхней части мешка мочеприемника прикроватного имеются отверстия для крепления к кровати пациента или придвижной стойке с помощью принадлежностей, таких как:

- крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного;
- держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного;
- стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного относятся к изделиям многоразового использования, предназначены для индивидуального применения.

 **Внимание!** Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного.

Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного используется для крепления мочеприемника прикроватного к кровати или придвижной стойке. В каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, вставляется крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного. Один мочеприемник прикроватный используется с двумя крючками-вешалками одинарными для крепления мочеприемника прикроватного.

Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного предназначен для фиксации мочеприемника прикроватного на боковине кровати. Он позволяет полностью развернуть мочеприемник прикроватный и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи. В каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного,

вставляются зубцы (штырьки) держателя-подвеса для крепления мочеприемника, размещенные на краях изделия. Один мочеприемник прикроватный используется с одним держателем-подвесом для крепления мочеприемника прикроватного. Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного способен точно и надежно удерживать его, расположив его оптимальным образом для осуществления сбора мочи. Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного имеет специальные «ушки», позволяющие зафиксировать мочеприемник прикроватный как на круглой, так и на квадратной раме кровати.

Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного обеспечивает возможность крепления мочеприемника прикроватного как на круглой, так и на квадратной раме кровати. Быстрое ступенчатое крепление стяжки и замковый механизм со специальными пазами для фиксации стяжки обеспечивают многократность использования, быстроту, отсутствие необходимости применения технологических приспособлений. В каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, вставляется стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного. Один мочеприемник прикроватный используется с двумя стяжками разъемными для крепления мочеприемника прикроватного.

Примечание: Для оптимального оттока мочи мочеприемник прикроватный необходимо размещать ниже уровня кровати.

Длинная приводная трубка, расположенная в верхней части мешка мочеприемника прикроватного, не перекручивается (устойчива к перегибам, исключает возможность блокировки оттока мочи). Прочный мешок мочеприемника прикроватного оснащен противовозвратным клапаном и универсальным коннектором типа «елочка» (закрыт колпачком) на конце приводной трубки. Противовозвратный клапан предупреждает риск ретроградного поступления бактерий в приводную трубку и возникновения перекрестного заражения. Универсальный коннектор конической формы переменного диаметра подходит ко всем типам урологических катетеров и уропрезервативов.

Мочеприемник прикроватный дренируемый оснащен специальной трубкой, по форме и функциям напоминающей небольшой кран, с помощью которой мочу можно слить в унитаз, не отделяя мочеприемник от урологического катетера или уропрезерватива. Для опорожнения мешка мочеприемника прикроватного дренируемого необходимо направить сливную трубку, расположенную в нижней части мешка мочеприемника прикроватного, в унитаз и открыть клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной), после опорожнения мешка – клапан необходимо закрыть.

Прозрачность / непрозрачность мешка мочеприемника прикроватного и приводной трубки не препятствует визуальному контролю поступающей жидкости. Мешок мочеприемника прикроватного не пропускает запах. Защитный колпачок предотвращает загрязнение коннектора типа «елочка».

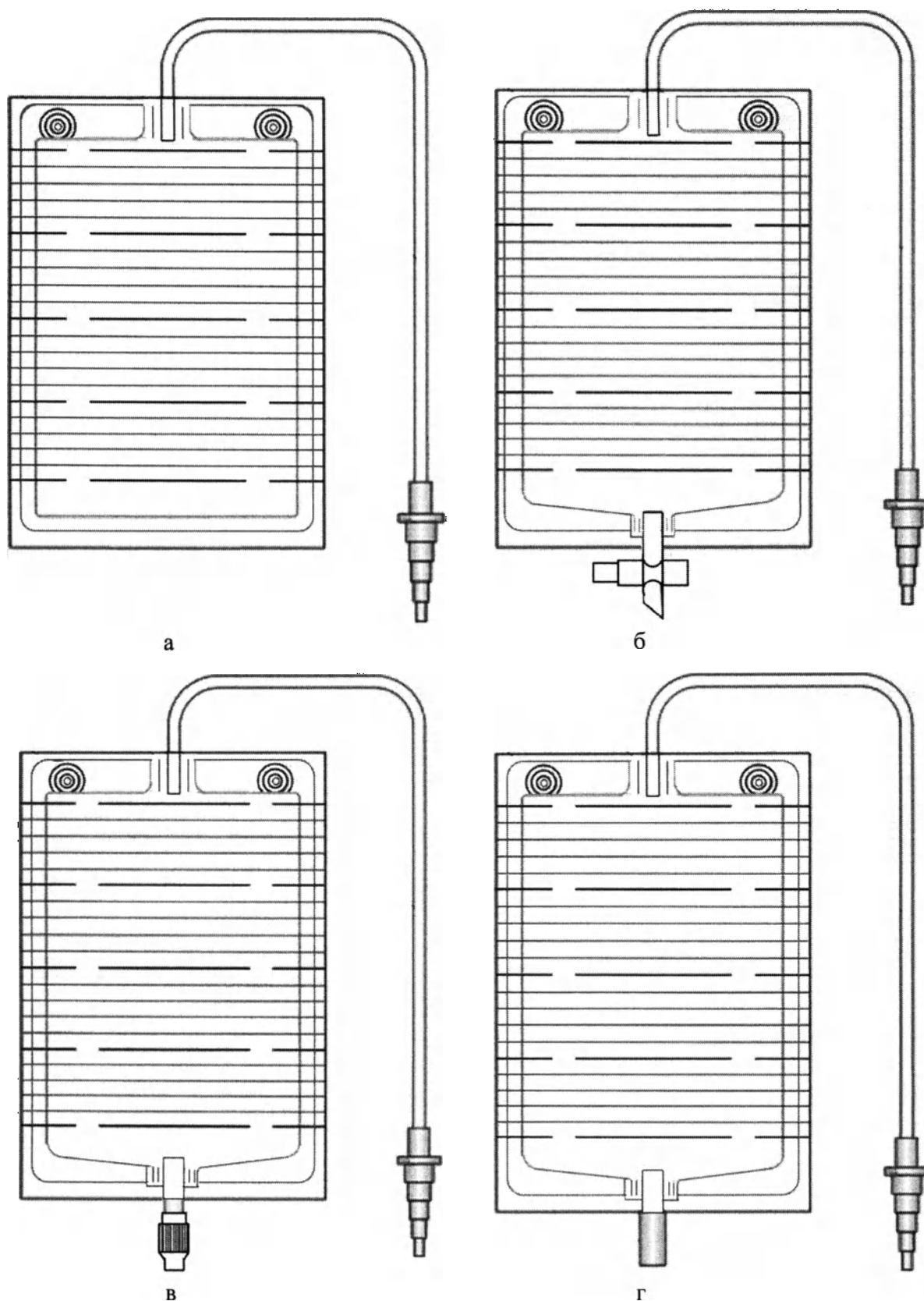


Рисунок 1 – Общий вид. Мочеприемник прикроватный ¹⁾

¹⁾ где: а – Мочеприемник прикроватный без сливного крана; б – Мочеприемник прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан); в – Мочеприемник прикроватный со сливным краном (винтовой клапан); г – Мочеприемник прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан)

Мочеприемник прикроватный оптимален для определения суточного диуреза.

Рекомендованное время использования мочеприемника прикроватного без сливного крана – до 24 часов, мочеприемника прикроватного со сливным краном – до 48 часов.

Использование мочеприемника прикроватного обеспечивает высокий уровень инфекционного контроля для профилактики урологической инфекции, тщательный уход за пациентом, защиту персонала от возможной контаминации.

В зависимости от объема мешка мочеприемник прикроватный может быть:

- 1000 мл:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- 1500 мл:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- 2500 мл:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

Объем мочеприемника прикроватного достаточен для того, чтобы вместить всю выделяемую за ночь мочу – от 1 до 2,5 л. Использование мочеприемника прикроватного позволяет человеку спокойно спать всю ночь, не боясь, что мешок переполнится. Разметка (шкала) на поверхности мешка мочеприемника прикроватного указывает на количество собранной жидкости для контроля врачом или самим пользователем.

В зависимости от степени прозрачности ПВХ-пленки мочеприемник прикроватный может быть:

- прозрачный:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- непрозрачный (белый):
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

Прозрачные / непрозрачные (белые) стенки мочеприемника прикроватного обеспечивают возможность визуального контроля цвета и количества мочи (наполняемости мешка).

В зависимости от длины трубки мочеприемник прикроватный может быть:

- 90 см:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- 120 см:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- 150 см:
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.

- [illegible]

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

Длинная гибкая приводная трубка (90 см / 120 см / 150 см) устойчива к перегибам. Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи. Конический универсальный коннектор типа «елочка» с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу урологического катетера, в т.ч. уропрезервативу.

В зависимости от наличия или отсутствия возможности дренирования мешка мочеприемник прикроватный может быть:

- дренируемый (открытый тип):

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- недренируемый (закрытый тип):
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

Мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытый тип) (рисунки 1, а) необходимо менять каждый раз по мере его заполнения, отсоединив его от урологического катетера или уропрезерватива. Мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытый тип) (рисунки 1, б, в, г) оснащен сливным краном с клапаном определенной конфигурации, с помощью которого мочу можно слить в унитаз или другую емкость, не отделяя мочеприемник прикроватный от урологического катетера или уропрезерватива.

В зависимости от типа клапана сливного крана мочеприемник прикроватный (дренируемый, открытый тип) может быть:

- Т-образный клапан:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.

- [illegible]

- [illegible]

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.

Конструкции сливного крана (клапана) надежны и в то же время максимально просты в использовании даже для людей с ограниченной ловкостью рук.

Сливной кран с Т-образным клапаном (рисунок 1, б) позволяет быстро опорожнять мешок мочеприемника прикроватного. Т-образный клапан дает возможность работать с мочеприемником прикроватным одной рукой, что обеспечивает высокий уровень гигиены и значительно снижает риск перекрестного инфицирования. Это очень удобно как для пациента, так и для медицинского персонала. Т-образный клапан (крестообразного типа) легко скользит в поперечном направлении и при совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника обеспечивает опорожнение мешка.

Сливной кран с винтовым клапаном (рисунок 1, в) на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприемник прикроватный в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости). Сливной кран (винтовой клапан)

открывается поворотом внешнего элемента винтового механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости.

Сливной кран с сдвижным клапаном (рисунок 1, г) также позволяет быстро и удобно опорожнять мешок мочеприемника прикроватного. Сливной кран (сдвижной клапан) открывается сдвигом вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости. При необходимости для освобождения мочеприемника прикроватного от содержимого необходимо сделать несколько поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана, чтобы увеличить ток мочи из мочеприемника прикроватного.

Мочеприемник одnorазовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый (рисунок 2) (далее – мочеприемник носимый) также крепится к урологическому катетеру или уропрезервативу, при помощи которого моча поступает в мешок мочеприемника носимого. В нижней части мешка мочеприемника носимого размещен специальный сливной кран с клапаном определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной), используемый для удобного слива мочи. Объем собранной жидкости легко считывается со шкалы, расположенной на передней стороне мешка мочеприемника носимого, изготовленного из прозрачного или непрозрачного (белого) поливинилхлорида (в зависимости от варианта исполнения).

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника носимого, не предназначена для точного измерения количества жидкости.

Мочеприемник носимый применяется с целью сбора мочи у подвижных пациентов. Основные отличия мочеприемника носимого от мочеприемника прикроватного заключаются в том, что мочеприемник носимый меньшего объема и конструктивно оснащен элементами крепления на ногу пациента. Мочеприемник носимый создан для тех, кто ведет активный образ жизни. Идеально подходит для мужчин. Он позволяет беспрепятственно перемещаться, что обеспечивает пациенту чувство свободы и не ограничивает его в передвижении.

В верхней и нижней частях мешка мочеприемника носимого имеются прорези для фиксации на ноге (бедре или голени) пациента с помощью принадлежностей, таких как:

- ремень для крепления мочеприемника носимого;
- завязка для крепления мочеприемника носимого.

Принадлежности для крепления мочеприемника носимого относятся к изделиям многократного использования, предназначены для индивидуального применения.

⚠ Внимание! Принадлежности для крепления мочеприемника носимого не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника носимого.

Ремень для крепления мочеприемника носимого используется для крепления мочеприемника носимого на ноге (бедре или голени) пациента. В прорези, расположенные в верхней

части мешка мочеприемника носимого, продевается первый ремень для крепления мочеприемника носимого, в прорези, расположенные в нижней части мешка мочеприемника носимого, – второй. Наличие у эластичного ремня для крепления мочеприемника носимого перфорации и двухсторонней кнопки позволяет регулировать изделие в соответствии с анатомическими особенностями пациента.

Примечание: Возможна фиксация мочеприемника носимого на ноге (бедре или голени) пациента только с помощью одного ремня для крепления мочеприемника носимого. Максимально возможное количество одновременно используемых ремней для крепления мочеприемника носимого – 2 шт.

Завязка для крепления мочеприемника носимого используется для крепления мочеприемника носимого на ноге (бедре или голени) пациента. В прорези, расположенные в верхней и нижней частях мешка мочеприемника носимого, продеваются завязки для крепления мочеприемника носимого: по одной штуке в каждую прорезь или по одной штуке в две прорези аналогично способу фиксации с помощью ремня для крепления мочеприемника носимого. Завязка для крепления мочеприемника носимого закрепляется на ноге пациента посредством завязывания узла и/или банта.

Примечание: Возможна фиксация мочеприемника носимого на ноге (бедре или голени) пациента только с помощью одной завязки для крепления мочеприемника носимого аналогично способу фиксации с помощью ремня для крепления мочеприемника носимого. Максимально возможное количество одновременно используемых завязок для крепления мочеприемника носимого – 4 шт.

Крепление мочеприемника носимого с помощью принадлежностей на бедре или голени пациента не мешает при ходьбе и не создает лишнего дискомфорта. Важно, чтобы мочеприемник носимый был зафиксирован ниже мочевого пузыря пациента. Благодаря надежному креплению мочеприемника носимого обеспечивается удобство его ношения, а не шуршащий материал, из которого изготовлен мешок, не выдаст его наличие.

Короткая приводная трубка, расположенная в верхней части мешка мочеприемника носимого, не перекручивается (устойчива к перегибам, исключает возможность блокировки оттока мочи). Прочный мешок мочеприемника носимого оснащен противовозвратным клапаном и универсальным коннектором типа «елочка» (закрыт колпачком) на конце приводной трубки. Противовозвратный клапан располагается в трубке на входе в сам мешок мочеприемника носимого. Он предотвращает вытекание мочи обратно в урологический катер или уропрезерватив, что исключает возможность распространения инфекции. Универсальный коннектор конической формы переменного диаметра подходит ко всем типам урологических катетеров и уропрезервативов.

Мочеприемник носимый оснащен специальной трубкой, по форме и функциям напоминающей небольшой кран, с помощью которой мочу можно слить в унитаз, не отделяя мочеприемник от урологического катетера или уропрезерватива. Для опорожнения мешка мочеприемника носимого необходимо направить сливную трубку, расположенную в нижней части мешка мочеприемника носимого, в унитаз и открыть клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной), после опорожнения мешка – клапан необходимо закрыть.

Прозрачность / непрозрачность мешка мочеприемника носимого и приводной трубки не препятствует визуальной контролю поступающей жидкости. Мешок мочеприемника носимого не пропускает запах. Защитный колпачок предотвращает загрязнение коннектора типа «елочка».

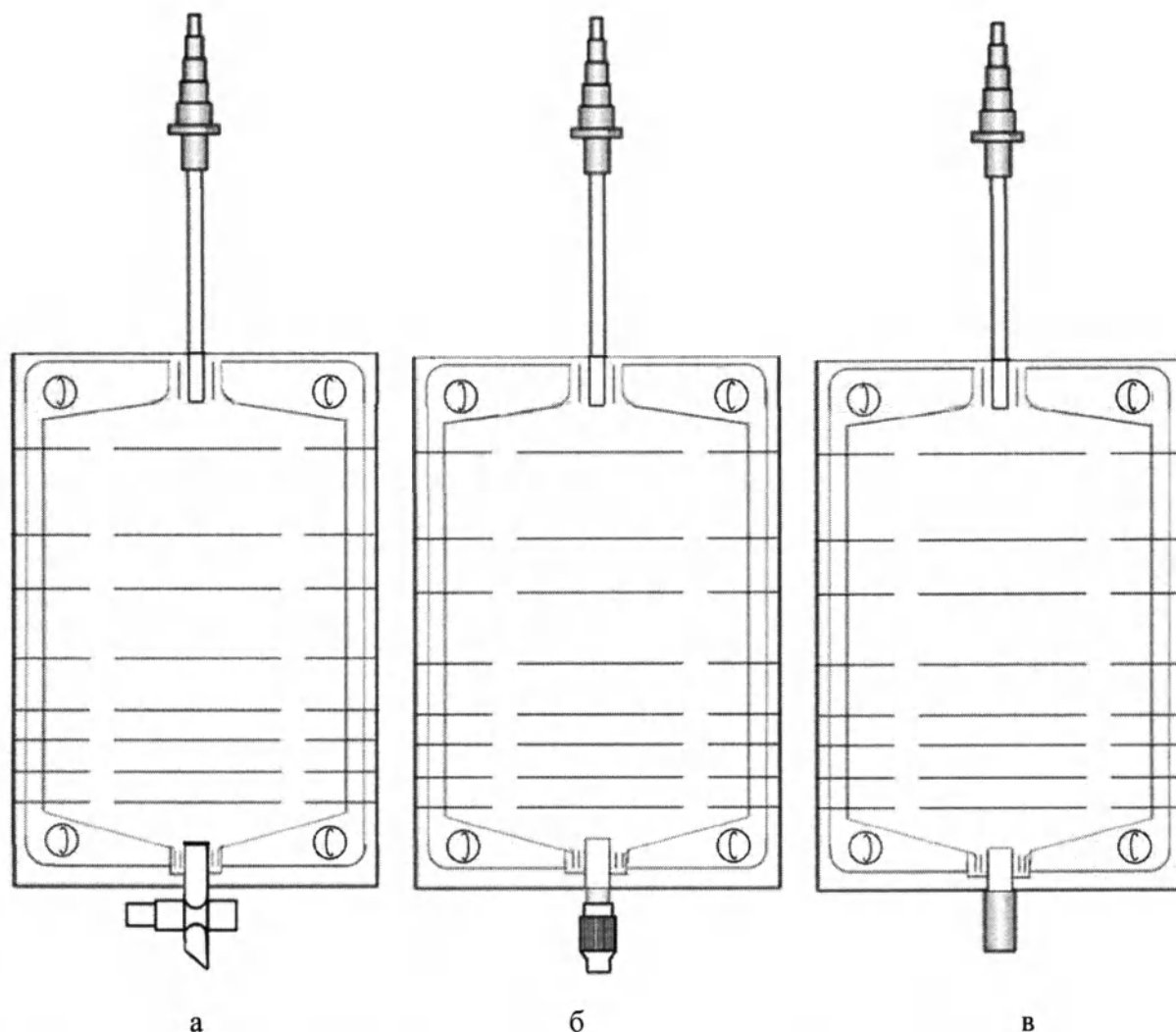


Рисунок 2 – Общий вид. Мочеприемник носимый, где:

а – Мочеприемник носимый со сливным краном (Т-образный клапан); б – Мочеприемник

носимый со сливным краном (винтовой клапан); в – Мочеприемник носимый со сливным краном (сдвижной клапан)

Мочеприемник носимый предназначен преимущественно для использования днем пациентами, передвигающимися самостоятельно, в отличие от мочеприемника прикроватного, используемого зачастую в ночное время, в т.ч. для лежачих больных.

Рекомендованное время использования мочеприемника носимого – до 48 часов.

Примечание: Мочеприемник носимый следует опорожнять до того, как он достигнет максимальной степени наполнения. Если мочеприемник носимый будет полон, то он станет некомфортным в использовании и начнет оказывать давление на урологический катетер или урорезерватив.

В зависимости от объема мешка мочеприемник носимый может быть:

- 500 мл:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- 750 мл:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- 1000 мл:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

Объем мочеприемника носимого колеблется от 500 мл до 1000 мл. Людям, ведущим активный образ жизни, с сохраненной функцией передвижения, рекомендуется использовать варианты исполнения мочеприемника носимого с мешками небольшого объема (500 мл / 750 мл). Пациентам, передвигающимся с трудом, удобнее будет пользоваться вариантом исполнения мочеприемника носимого большего объема (1000 мл) – для них не так важно, что он будет замечен при носке, но при этом мешок не придется часто опорожнять. Разметка (шкала) на поверхности мешка мочеприемника носимого указывает на количество собранной жидкости для контроля врачом или самим пользователем.

В зависимости от степени прозрачности ПВХ-пленки мочеприемник носимый может быть:

- прозрачный:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.

[illegible]

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

Прозрачные / непрозрачные (белые) стенки мочеприемника носимого обеспечивают возможность визуального контроля цвета и количества мочи (наполняемости мешка).

В зависимости от длины трубки мочеприемник носимый может быть:

- 10 см:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- 30 см:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- 50 см:
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
 - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

Короткая гибкая приводная трубка (10 см / 30 см / 50 см) устойчива к перегибам. Абсолютно гладкая внутренняя поверхность трубки предотвращает застой мочи. Конический универсальный коннектор типа «елочка» с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу урологического катетера, в т.ч. уретерезервату.

В зависимости от типа клапана сливного крана мочеприемник носимый может быть:

- Т-образный клапан:

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

- 67

- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.
- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

Конструкции сливного крана (клапана) надежны и в то же время максимально просты в использовании даже для людей с ограниченной ловкостью рук.

Сливной кран с Т-образным клапаном (рисунок 2, а) позволяет быстро опорожнять мешок мочеприемника носимого. Т-образный клапан дает возможность работать с мочеприемником носимым одной рукой, что обеспечивает высокий уровень гигиены и значительно снижает риск перекрестного инфицирования. Т-образный клапан (крестообразного типа) легко скользит в поперечном направлении и при совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника обеспечивает опорожнение мешка.

Сливной кран с винтовым клапаном (рисунок 2, б) на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприемник носимый в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости). Сливной кран (винтовой клапан) открывается поворотом внешнего элемента винтового механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости.

Сливной кран с сдвижным клапаном (рисунок 2, в) также позволяет быстро и удобно опорожнять мешок мочеприемника носимого. Сливной кран (сдвижной клапан) открывается сдвигом вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости. При необходимости для освобождения мочеприемника носимого от содержимого необходимо сделать несколько поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана, чтобы увеличить ток мочи из мочеприемника носимого.

Примечание: Выбор варианта исполнения мочеприемника зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей пациента. При этом от качества изготовления мочеприемника зависит здоровье его пользователя, а также здоровье медицинского персонала.

2.3 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Мочеприемник может использоваться квалифицированными медицинскими работниками в условиях ЛПУ, а также квалифицированными медицинскими работниками или «компетентными» взрослыми в домашних условиях, при отсутствии противопоказаний.

Примечание: Под «компетентным» взрослым понимается взрослый человек (старше 18 лет), прошедший обучение у квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

2.4 ПОКАЗАНИЯ

2.4.1 Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый

Сбор мочи, отводимой с помощью урологических катетеров, в т.ч. уропрезервативов, у мобильных (подвижных) взрослых пациентов / подростков с кратковременными или стойкими нарушениями функции мочевыделительной системы.

2.4.2 Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный

Сбор мочи, отводимой с помощью урологических катетеров, в т.ч. уропрезервативов, у взрослых пациентов / подростков с кратковременными или стойкими нарушениями функции мочевыделительной системы, находящихся в лежачем положении.

2.5 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость материала.

2.6 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний, противопоказаний, неблагоприятные последствия после использования мочеприемника отмечаются редко, но у некоторых пациентов возможно возникновение аллергической реакции на материалы, из которых изготовлен мочеприемник (индивидуальная непереносимость материала).

 Мочеприемник носимый разрешается фиксировать только на здоровых участках кожного покрова ноги (бедро, голени). В случае раздражения кожного покрова, использование мочеприемника должно быть временно прекращено.

2.7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Используйте мочеприемник только в соответствии с данной инструкцией по применению.
- Используйте мочеприемник только по назначению, то есть для сбора мочи.
- К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.
- Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.
- Учитывайте информацию, полученную из предупредительных знаков, и соблюдайте меры предосторожности, работая с мочеприемником.
- Перед каждым использованием всегда проверяйте мочеприемник на предмет механических повреждений, обесцвечивания и посторонних включений.
- Эксплуатация мочеприемника не допускается в случае повреждения каких-либо его частей, нарушения целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки.
- Если Вы занесли мочеприемник с холода в теплое помещение, не используйте его сразу, выдержите мочеприемник в транспортной упаковке при комнатной температуре не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.
- При работе с мочеприемником рекомендуется проводить предварительную антисептику кожи рук и/или использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки).
- Запрещается повторное использование мочеприемника. Мочеприемник относится к изделиям для однократного применения.
- Использование одного мочеприемника для нескольких пациентов может привести к возникновению инфекции.
- Запрещается использование принадлежностей для крепления мочеприемника несколькими пациентами с целью предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника. Принадлежности для крепления мочеприемника относятся к изделиям многоразового использования.
- Не используйте мочеприемник после истечения его срока годности.

- Не допускайте переполнения мочеприемника.
- Не используйте мочеприемник для сбора анализа мочи. Результаты анализа мочи могут быть недостоверными ввиду нестерильности изделия, что, как следствие, затруднит постановку правильного диагноза и проведение адекватного лечения.
- Мочеприемник носимый разрешается фиксировать только на здоровых участках кожного покрова ноги (бедро, голени). В случае раздражения кожного покрова, использование мочеприемника должно быть временно прекращено.
- Мочеприемник подлежит регулярной замене в соответствии с установленным в настоящем документе интервалом времени (рекомендованным временем). При наличии загрязнений или визуального повреждения изделия мочеприемник также следует заменить.
- Медицинские изделия для использования в комбинации с мочеприемником должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий или других предусмотренных документов и должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
- Хранить вдали от нагревательных приборов, в хорошо вентилируемом помещении, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник в зависимости от степени потенциального риска применения относится к медицинским изделиям с низкой степенью риска – к классу 1.

Вид и продолжительность контакта с организмом пациента:

- мочеприемника одноразового нестерильного ИНТРАЛОН® прикроватного без сливного крана – кратковременный (менее 24 часов) с неповрежденной кожей и кратковременный (менее 24 часов) опосредованный с неповрежденными слизистыми оболочками;
- мочеприемника одноразового нестерильного ИНТРАЛОН® прикроватного со сливным краном – кратковременный (менее 24 часов) с неповрежденной кожей и длительный (более 24 часов, но не более 30 сут.) опосредованный с неповрежденными слизистыми оболочками;
- мочеприемника одноразового нестерильного ИНТРАЛОН® носимого – длительный (более 24 часов, но не более 30 сут.) с неповрежденной кожей и длительный (более 24 часов, но не более 30 сут.) опосредованный с неповрежденными слизистыми оболочками;
- принадлежностей для мочеприемника прикроватного (крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного, держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного, стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного) – кратковременный (менее 24 часов) с неповрежденной кожей;
- принадлежностей для мочеприемника носимого (ремня для крепления мочеприемника носимого, завязки для крепления мочеприемника носимого) – длительный (более 24 часов, но не более 30 сут.) с неповрежденной кожей.

4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) с указанием его конструктивных элементов приведен на рисунке 3.

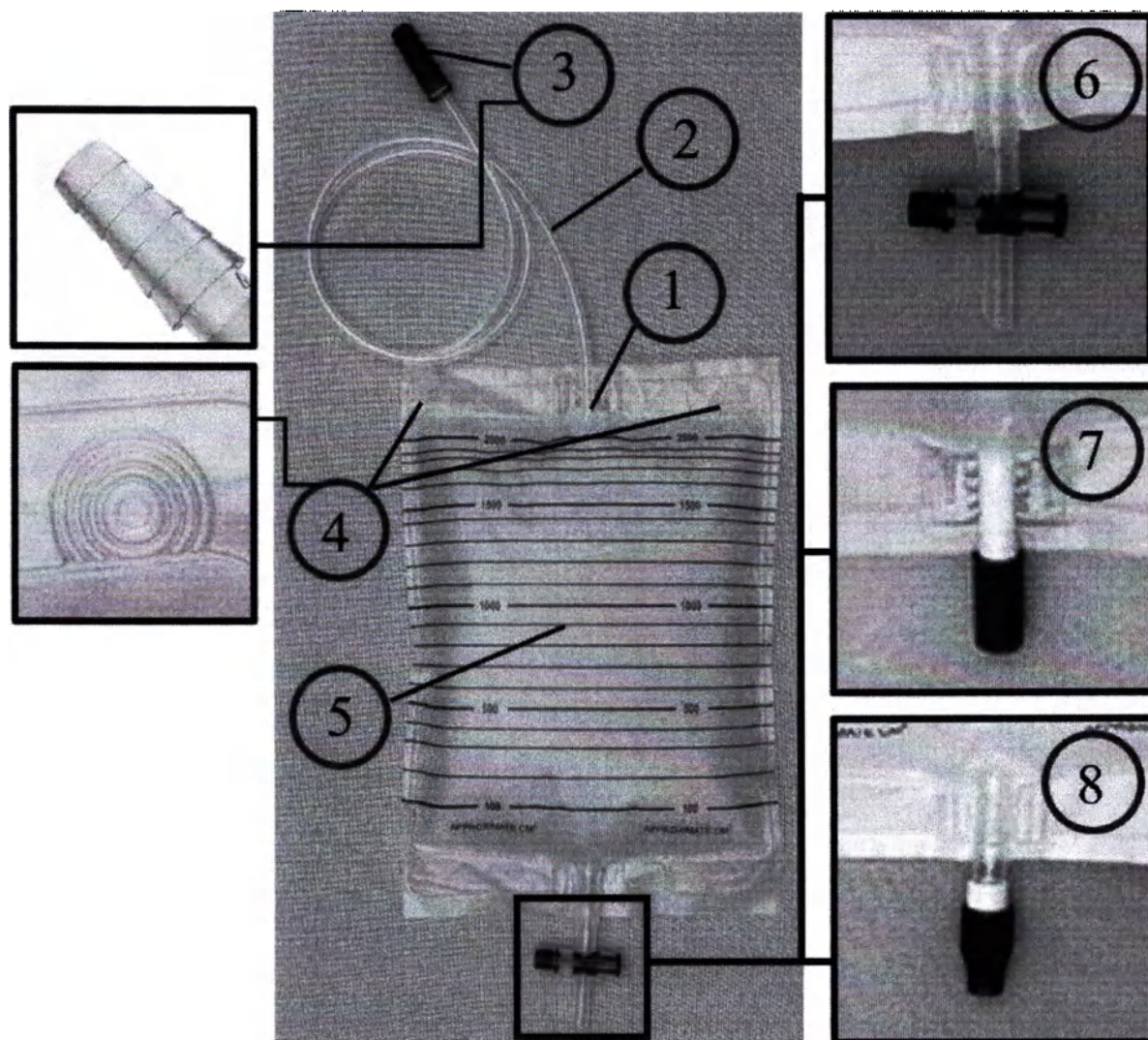


Рисунок 3 – Внешний вид с указанием конструктивных элементов. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном, где: 1 – Противовозвратный клапан; 2 – Приводная трубка; 3 – Коннектор типа «елочка» с колпачком; 4 – Отверстия для крепления к кровати пациента или штативу (придвижной стойке) с помощью принадлежностей; 5 – Мешок со шкалой; 6 – Сливной кран (Т-образный клапан); 7 – Сливной кран (сдвижной клапан); 8 – Сливной кран (винтовой клапан)

- Встроенный противозовратный клапан (рисунок 3 поз. 1) обеспечивает свободный поток жидкости внутрь мочеприемника прикроватного, но при этом предотвращает обратный ток мочи (полностью исключает вероятность обратного движения мочи в урологический

катетер или уропрезерватив), значительно снижая риск развития восходящей инфекции мочевыводящих путей.

- Приводная (подводящая) трубка (рисунок 3 поз. 2) определенной длины (90 см / 120 см / 150 см), расположенная в верхней части мочеприемника прикроватного, имеет универсальный коннектор конической формы переменного диаметра – коннектор типа «елочка» (рисунок 3 поз. 3), подходящий к урологическим катетерам и уропрезервативам любого размера и типа. Коннектор типа «елочка» закрыт защитным колпачком (рисунок 3 поз. 3), предотвращающим его загрязнение.

- Два отверстия (уплотненные кольца) (рисунок 3 поз. 4), расположенные в верхних углах мешка мочеприемника прикроватного, предназначены для крепления к кровати пациента или штативу (придвижной стойке) с помощью принадлежностей таких как крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного, держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного или стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

- На передней поверхности мешка мочеприемника прикроватного определенного объема (1000 мл / 1500 мл / 2000 мл / 2500 мл) (рисунок 3 поз. 5) нанесена разметка (шкала) для считывания медицинским персоналом или самим пациентом показаний заполнения мочеприемника прикроватного мочой (определения объема и цвета мочи) с целью его своевременного опорожнения или замены.

- Сливной кран с клапаном определенной конфигурации (рисунок 3 поз. 6-8), расположенный в нижней части мочеприемника прикроватного (дренируемого, открытого типа), предназначен для опорожнения мешка во время его использования. Сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 3 поз. 6) крестообразного типа легко скользит в поперечном направлении и при совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника прикроватного обеспечивает опорожнение мешка. Сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 3 поз. 7) позволяет быстро и удобно опорожнять мешок мочеприемника прикроватного посредством сдвига вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающего просвет для движения жидкости. При этом осуществление нескольких поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана обеспечивает увеличение тока мочи из мочеприемника прикроватного. Сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 3 поз. 8) представляет собой трубку, на конце которой расположен несъемный закручивающийся / откручивающийся запорный механизм типа «мама-папа». Сливной кран (винтовой клапан) открывается поворотом внешнего элемента винтового механизма типа «мама», обеспечивающим просвет для движения жидкости.

Внешний вид мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа) с указанием его конструктивных элементов приведен на рисунке 4.

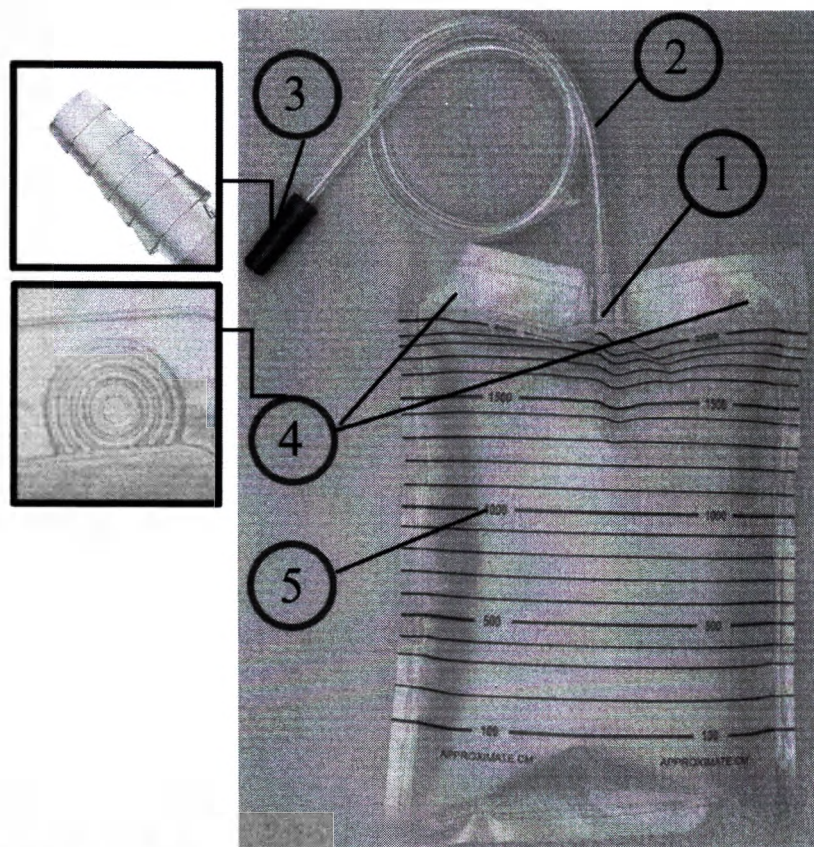


Рисунок 4 – Внешний вид с указанием конструктивных элементов. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, где: 1 – Противовозвратный клапан; 2 – Приводная трубка; 3 – Коннектор типа «елочка» с колпачком; 4 – Отверстия для крепления к кровати пациента или штативу (придвижной стойке) с помощью принадлежностей; 5 – Мешок со шкалой

- Встроенный противозвратный клапан (рисунок 4 поз. 1) обеспечивает свободный поток жидкости внутрь мочеприемника прикроватного, но при этом предотвращает обратный ток мочи (полностью исключает вероятность обратного движения мочи в урологический катетер или уропрезерватив), значительно снижая риск развития восходящей инфекции мочевыводящих путей.

- Приводная (подводящая) трубка (рисунок 4 поз. 2) определенной длины (90 см / 120 см / 150 см), расположенная в верхней части мочеприемника прикроватного, имеет универсальный коннектор конической формы переменного диаметра – коннектор типа «елочка» (рисунок 4 поз. 3), подходящий к урологическим катетерам и уропрезервативам любого размера и типа. Коннектор типа «елочка» закрыт защитным колпачком (рисунок 4 поз. 3), предотвращающим его загрязнение.

- Два отверстия (уплотненные кольца) (рисунок 4 поз. 4), расположенные в верхних углах мешка мочеприемника прикроватного, предназначены для крепления к кровати паци-

ента или штативу (придвижной стойке) с помощью принадлежностей таких как крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного, держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного или стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

- На передней поверхности мешка мочеприемника прикроватного определенного объема (1000 мл / 1500 мл / 2000 мл / 2500 мл) (рисунок 4 поз. 5) нанесена разметка (шкала) для считывания медицинским персоналом или самим пациентом показаний заполнения мочеприемника прикроватного мочой (определения объема и цвета мочи) с целью его своевременного опорожнения или замены.

Внешний вид мочеприемника носимого с указанием его конструктивных элементов приведен на рисунке 5.

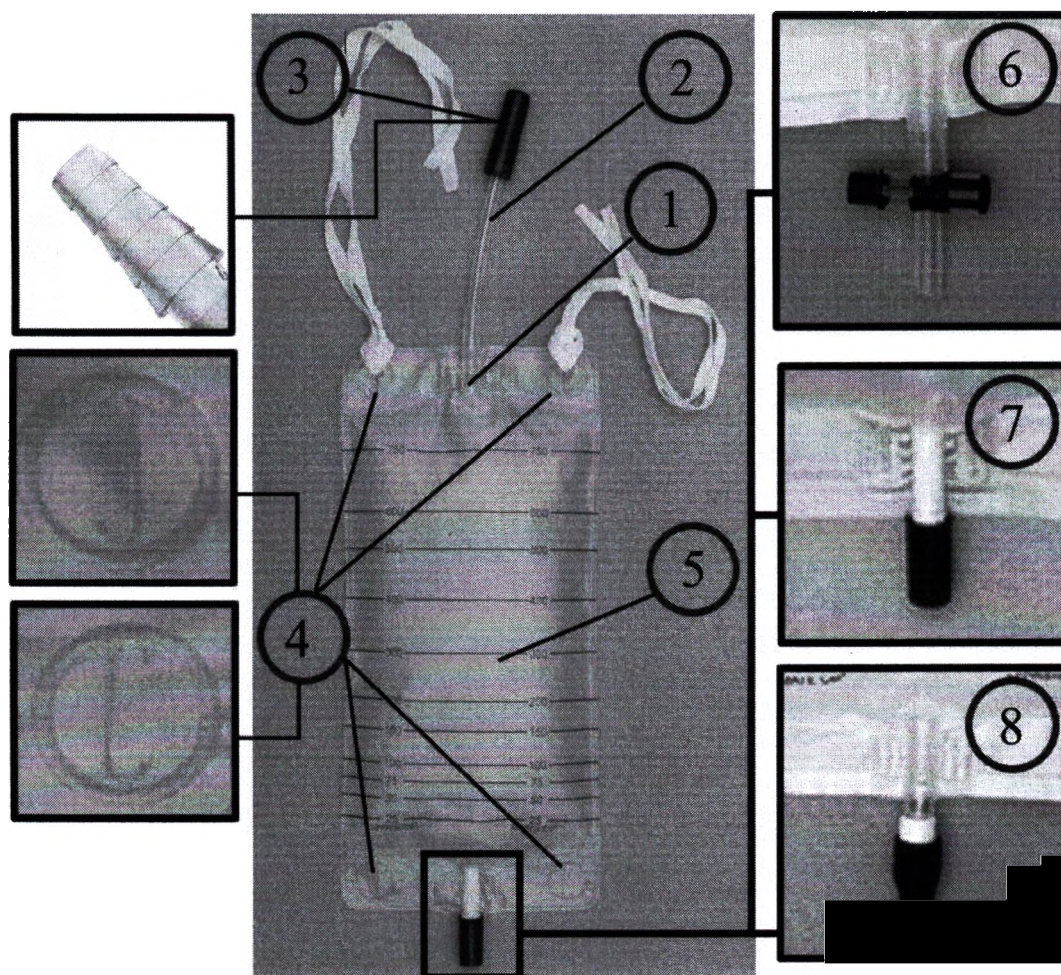


Рисунок 5 – Внешний вид с указанием конструктивных элементов. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый*, где: 1 – Противовозвратный клапан; 2 – Приводная трубка; 3 – Коннектор типа «елочка» с колпачком; 4 – Прорези для фиксации на ноге пациента с помощью принадлежностей; 5 – Мешок со шкалой; 6 – Сливной кран

(Т-образный клапан); 7 – Сливной кран (сдвижной клапан); 8 – Сливной кран (винтовой клапан)

** На рисунке 5 мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном показан с двумя завязками для крепления мочеприемника носимого, являющимися его принадлежностями.*

- Встроенный противовозвратный клапан (рисунок 5 поз. 1) обеспечивает свободный поток жидкости внутрь мочеприемника носимого, но при этом предотвращает обратный ток мочи (полностью исключает вероятность обратного движения мочи в урологический катетер или уропрезерватив), значительно снижая риск развития восходящей инфекции мочевыводящих путей.

- Приводная (подводящая) трубка (рисунок 5 поз. 2) определенной длины (10 см / 30 см / 50 см), расположенная в верхней части мочеприемника носимого, имеет универсальный коннектор конической формы переменного диаметра – коннектор типа «елочка» (рисунок 5 поз. 3), подходящий к урологическим катетерам и уропрезервативам любого размера и типа. Коннектор типа «елочка» закрыт защитным колпачком (рисунок 5 поз. 3), предотвращающим его загрязнение.

- Четыре прорези (рисунок 5 поз. 4), расположенные в верхних и нижних углах мешка мочеприемника прикроватного (по 2 шт.), предназначены для фиксации на ноге (бедре или голени) пациента с помощью принадлежностей таких как ремень для крепления мочеприемника носимого, завязка для крепления мочеприемника носимого.

- На передней поверхности мешка мочеприемника прикроватного определенного объема (500 мл / 750 мл / 1000 мл) (рисунок 5 поз. 5) нанесена разметка (шкала) для считывания медицинским персоналом или самим пациентом показаний заполнения мочеприемника носимого мочой (определения объема и цвета мочи) с целью его своевременного опорожнения или замены.

- Сливной кран с клапаном определенной конфигурации (рисунок 5 поз. 6-8), расположенный в нижней части мочеприемника носимого, предназначен для опорожнения мешка во время его использования. Сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 5 поз. 6) крестообразного типа легко скользит в поперечном направлении и при совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника носимого обеспечивает опорожнение мешка. Сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 5 поз. 7) позволяет быстро и удобно опорожнять мешок мочеприемника носимого посредством сдвига вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающего просвет для движения жидкости. При этом осуществление нескольких поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана обеспечивает увеличение тока мочи из мочеприемника носимого. Сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 5 поз. 8) представляет собой трубку, на конце которой расположен несъемный закручи-

вающийся / откручивающийся запорный механизм типа «мама-папа». Сливной кран (винтовой клапан) открывается поворотом элемента винтового механизма типа «мама», обеспечивающим просвет для движения жидкости.

Внешний вид принадлежностей для крепления мочеприемника прикроватного приведен на рисунке 6.

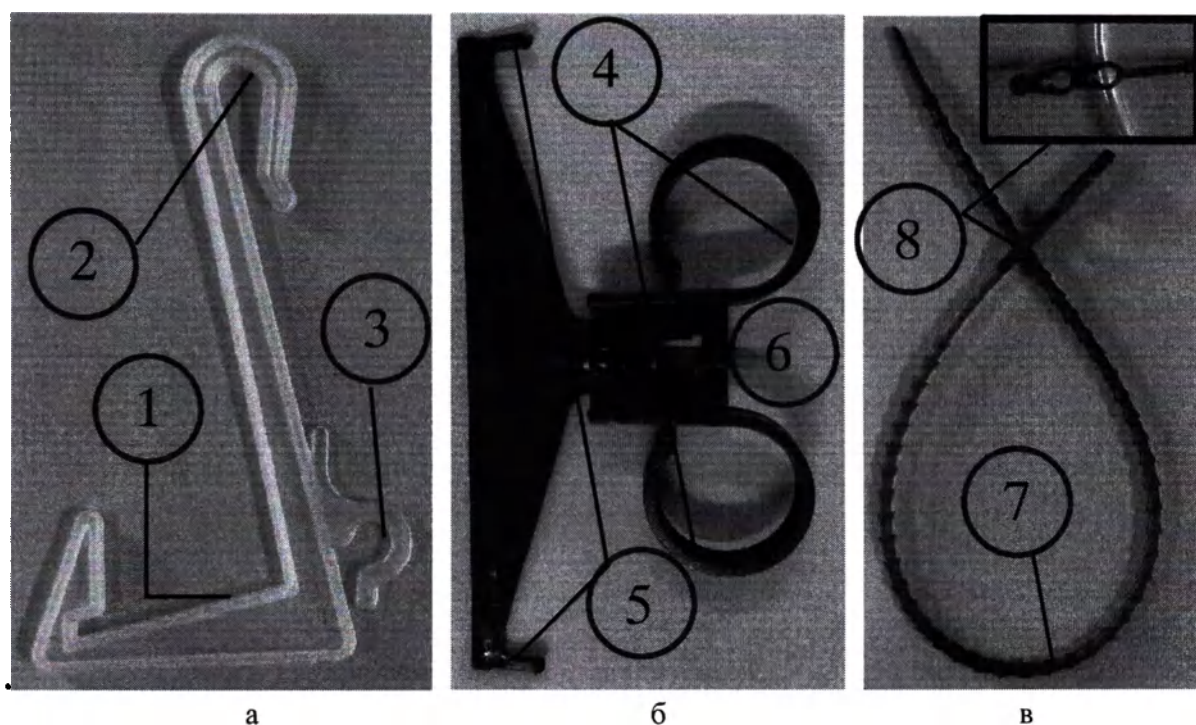


Рисунок 6 – Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного, где: а – Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного.; б – Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного; в – Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного, где: 1 – Полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке); 2 – Полукруглый крючок для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного; 3 – «Ушко» для крепления приводной (подводящей) трубки.; 4 – Полукруглые крючки для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке); 5 – Зубцы (штырьки) для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного; 6 – «Ушки» для крепления приводной (подводящей) трубки; 7 – Ступенчатый хомут (стяжка); 8 – Замковый механизм со специальными пазами для фиксации стяжки

Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, а), держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, б) или стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, в) вставляются в отвер-


ствия (уплотненные кольца) (рисунок 3, 4 поз. 4), расположенные в верхней части мешка моче-приемника прикроватного, и крепятся к кровати пациента или штативу (придвижной стойке). Данные принадлежности могут зафиксировать мочеприемник прикроватный как на круглой, так и на квадратной раме кровати.

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, а) имеет один полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке) и полукруглый крючок для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного, т.е. для крепления мочеприемника прикроватного к крючку-вешалке одинарному. Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного также снабжен «ушком» для крепления приводной (подводящей) трубки.

- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, б) имеет два полукруглых крючка для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке) и два зубца (штырька), размещенные на краях изделия, для вставки в отверстия мешка мочеприемника прикроватного, т.е. для крепления мочеприемника прикроватного к держателю-подвесу. Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного также снабжен «ушками» для крепления приводной (подводящей) трубки.

- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, в) имеет быстрое ступенчатое крепление и замковый механизм со специальными пазами для фиксации стяжки.

Внешний вид принадлежностей для крепления мочеприемника носимого приведен на рисунке 7.

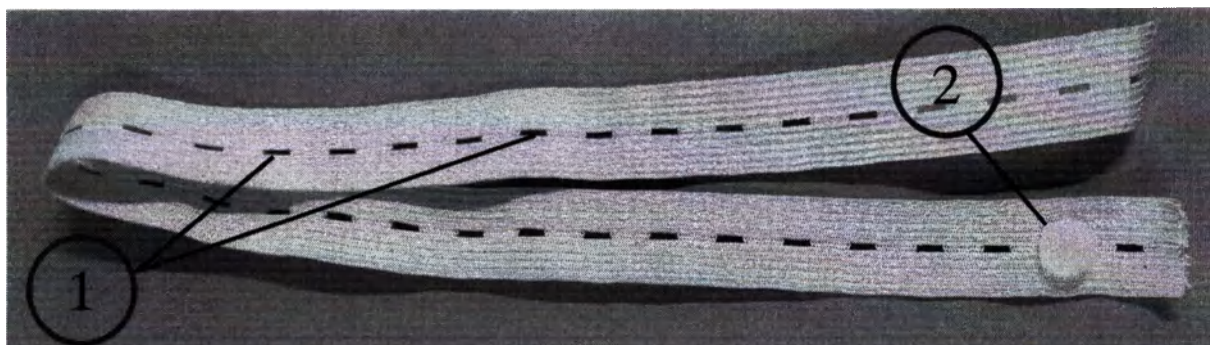

а



6

Рисунок 7 – Принадлежности для крепления мочеприемника носимого, где:

а – Ремень для крепления мочеприемника носимого; б – Завязка для крепления мочеприемника носимого, где: 1 – Перфорация; 2 – Двухсторонняя кнопка

Ремень для крепления мочеприемника носимого (рисунок 7, а) или завязка для крепления мочеприемника носимого (рисунок 7, б) продеваются в прорези (рисунок 5 поз. 4), расположенные в верхней и нижней частях мешка мочеприемника носимого, и фиксируются на ноге (бедре или голени) пациента. Благодаря надежному креплению мочеприемника носимого обеспечивается удобство его ношения.

- Ремень для крепления мочеприемника носимого (рисунок 7, а) имеет перфорацию и двухстороннюю кнопку, позволяющие регулировать изделие в соответствии с анатомическими особенностями пациента. Ремень для крепления мочеприемника носимого закрепляется на ноге пациента посредством вставки двухсторонней кнопки в прорезь на любом приемлемом для пациента уровне (бедре или голени).

- Завязка для крепления мочеприемника носимого (рисунок 7, б) закрепляется на ноге пациента посредством завязывания узла и/или банта.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**5.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

5.1.1 Мочеприемник соответствует требованиям ISO 8669-2:1996 (GB/T 17257.2:2009), настоящего документа, комплекту конструкторской документации (КД) Изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

5.1.2 Основные размеры, объем и масса мочеприемника соответствуют значениям, указанным в таблице 1. Допускаемое отклонение размеров и объема $\pm 10\%$.

5.1.3 Конструкция и внешний вид мочеприемника соответствуют рисунку 1-5 и таблице 1 настоящего документа.

Таблица 1 – Основные размеры, объем и масса мочеприемника

№	Наименование изделия	Размеры (Высота Широта) мм	Глубина мм	Неско- лько штук в упаковке	Длина трубки мм	Объем л	Тип клапана	Масса г
1	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный	270 x 160	50	1000	900	6	Т-образный	1, 6; 3
2	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	Т-образный	1, 6; 3
3	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	Т-образный	1, 6; 3
4	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	900	6	Т-образный	1, 6; 3
5	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	Т-образный	1, 6; 3

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
6	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	Т-образный	1, б; 3
7	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	900	6	Т-образный	1, б; 3
8	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	Т-образный	1, б; 3
9	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	Т-образный	1, б; 3
10	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	900	6	Т-образный	1, б; 3
11	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	Т-образный	1, б; 3
12	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	Т-образный	1, б; 3
13	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный	280 x 200	60	2000	900	6	Т-образный	1, б; 3

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
	со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.							
14	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	Т-образный	1, б; 3
15	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	Т-образный	1, б; 3
16	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	Т-образный	1, б; 3
17	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	Т-образный	1, б; 3
18	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	Т-образный	1, б; 3
19	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	Т-образный	1, б; 3
20	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	Т-образный	1, б; 3

№	Наименование изделия	Размеры Длина Широта	Высота Полнота	Нормы высоты полноты	Размеры Длина Широта	Размеры Длина Широта	Размеры Длина Широта	Размеры Длина Широта
21	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	Т-образный	1, б; 3
22	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	Т-образный	1, б; 3
23	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	Т-образный	1, б; 3
24	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	Т-образный	1, б; 3
25	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	900	6	Винтовой	1, в; 3
26	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	Винтовой	1, в; 3
27	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	Винтовой	1, в; 3
28	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный	270 x 160	50	1000	900	6	Винтовой	1, в; 3

№	Наименование изделия (модель, артикул)	Размеры (Длина x Ширина x Высота), мм	Материал	Объем, мл	Длина трубки, см	Количество отверстий	Тип крепления	Дополнительные сведения
	со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.							
29	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	Винтовой	1, в; 3
30	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	Винтовой	1, в; 3
31	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	900	6	Винтовой	1, в; 3
32	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	Винтовой	1, в; 3
33	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	Винтовой	1, в; 3
34	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	900	6	Винтовой	1, в; 3
35	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	Винтовой	1, в; 3

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
36	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	Винтовой	1, в; 3
37	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	Винтовой	1, в; 3
38	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	Винтовой	1, в; 3
39	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	Винтовой	1, в; 3
40	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	Винтовой	1, в; 3
41	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	Винтовой	1, в; 3
42	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	Винтовой	1, в; 3
43	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный	310 x 240	65	2500	900	6	Винтовой	1, в; 3

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
	со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.							
44	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	Винтовой	1, в; 3
45	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	Винтовой	1, в; 3
46	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	Винтовой	1, в; 3
47	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	Винтовой	1, в; 3
48	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	Винтовой	1, в; 3
49	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	900	6	Сдвижной	1, г; 3
50	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	Сдвижной	1, г; 3

№	Наименование изделия (полное наименование)	Размер изделия (высота х ширина, см)	Масса, г, не более	Несколько мест использования	Длина шлангов, см	Время использования, мин	Тип защелки	Примечание
51	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
52	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	900	6	Сдвижной	1, г, 3
53	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	Сдвижной	1, г, 3
54	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
55	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	900	6	Сдвижной	1, г, 3
56	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	Сдвижной	1, г, 3
57	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
58	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный со сливным краном	280 x 190	55	1500	900	6	Сдвижной	1, г, 3

№	Наименование изделия (модель, артикул)	Размер изделия (мм)	Материал	Назначение	Длина трубки (см)	Объем емкости (мл)	Тип клапана	Дополнительные характеристики
	(сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.							
59	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	Сдвижной	1, г, 3
60	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
61	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	Сдвижной	1, г, 3
62	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	Сдвижной	1, г, 3
63	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
64	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	Сдвижной	1, г, 3
65	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	Сдвижной	1, г, 3

№	Наименование изделия (полное наименование)	Размеры (Длина x Ширина) (мм)	Масса, г, не более	Объем, мл, не менее	Длина трубки, см, не менее	Размер отверстия, мм	Тип защелки	Дополнительно
66	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
67	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	Сдвижной	1, г, 3
68	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	Сдвижной	1, г, 3
69	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
70	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	Сдвижной	1, г, 3
71	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	Сдвижной	1, г, 3
72	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	Сдвижной	1, г, 3
73	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем	270 x 160	50	1000	900	6	-	1, г, 3

№	Наименование изделия	Размеры Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Объем мл	Длина трубки см	Материал	Примечание
	1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.							
74	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	-	1, а; 4
75	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	-	1, а; 4
76	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	900	6	-	1, а; 4
77	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1200	6	-	1, а; 4
78	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	270 x 160	50	1000	1500	6	-	1, а; 4
79	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	900	6	-	1, а; 4
80	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	-	1, а; 4
81	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	-	1, а; 4
82	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® прикроватный	280 x 190	55	1500	900	6	-	1, а; 4

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
	без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, не-прозрачный.							
83	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, не-прозрачный.	280 x 190	55	1500	1200	6	-	1, а; 4
84	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, не-прозрачный.	280 x 190	55	1500	1500	6	-	1, а; 4
85	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	-	1, а; 4
86	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	-	1, а; 4
87	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	-	1, а; 4
88	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, не-прозрачный.	280 x 200	60	2000	900	6	-	1, а; 4
89	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, не-прозрачный.	280 x 200	60	2000	1200	6	-	1, а; 4
90	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, не-прозрачный.	280 x 200	60	2000	1500	6	-	1, а; 4

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
91	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	-	1, а; 4
92	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	-	1, а; 4
93	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	-	1, а; 4
94	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	900	6	-	1, а; 4
95	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1200	6	-	1, а; 4
96	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	310 x 240	65	2500	1500	6	-	1, а; 4
97	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.	245 x 135	35	500	100	6	Т-образный	2, а; 5
98	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.	245 x 135	35	500	300	6	Т-образный	2, а; 5
99	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со	245 x 135	35	500	500	6	Т-образный	2, а; 5

№	Наименование изделия	Размеры (ДхШхВ, мм)	Материал	Объем, мл	Длина трубки, см	Диаметр трубки, мм	Тип дренажа	Примечание
	сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.							
100	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	245 x 135	35	500	100	6	Т-образный	2, а; 5
101	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	245 x 135	35	500	300	6	Т-образный	2, а; 5
102	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	245 x 135	35	500	500	6	Т-образный	2, а; 5
103	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	100	6	Т-образный	2, а; 5
104	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	300	6	Т-образный	2, а; 5
105	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	500	6	Т-образный	2, а; 5
106	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	100	6	Т-образный	2, а; 5

№	Наименование изделия и его основные характеристики	Размеры внешние мм	Высота г. мм мм	Длина трубки мм	Длина короткой трубки мм	Вместимость л	Форма изделия	Материал
107	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	300	6	Т-образный	2, а; 5
108	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	500	6	Т-образный	2, а; 5
109	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	100	6	Т-образный	2, а; 5
110	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	300	6	Т-образный	2, а; 5
111	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	500	6	Т-образный	2, а; 5
112	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	100	6	Т-образный	2, а; 5
113	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	300	6	Т-образный	2, а; 5
114	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со	310 x 150	50	1000	500	6	Т-образный	2, а; 5

№	Наименование изделия	Габариты изделия (ДхШхВ, мм)	Высота, мм	Нижняя ширина, мм	Длина трубки, мм	Диаметр трубки, мм	Тип крепления	Дополнительные параметры
	сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.							
115	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.	245 x 135	35	500	100	6	Винтовой	2, 6; 5
116	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.	245 x 135	35	500	300	6	Винтовой	2, 6; 5
117	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.	245 x 135	35	500	500	6	Винтовой	2, 6; 5
118	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	245 x 135	35	500	100	6	Винтовой	2, 6; 5
119	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	245 x 135	35	500	300	6	Винтовой	2, 6; 5
120	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	245 x 135	35	500	500	6	Винтовой	2, 6; 5
121	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	100	6	Винтовой	2, 6; 5
122	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮНФ носимый со	280 x 135	45	750	300	6	Винтовой	2, 6; 5

№	Наименование изделия и его основные характеристики	Размеры изделия (Длина x Ширина x Высота)	Масса, г, не более	Несущая способность, кг	Длина шланга, см	Время действия после открытия, ч	Тип соединения шланга	Код изделия
	сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.							
123	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	500	6	Винтовой	2, 6; 5
124	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	100	6	Винтовой	2, 6; 5
125	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	300	6	Винтовой	2, 6; 5
126	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	500	6	Винтовой	2, 6; 5
127	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	100	6	Винтовой	2, 6; 5
128	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	300	6	Винтовой	2, 6; 5
129	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛЮН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	500	6	Винтовой	2, 6; 5

№ модели	Наименование изделия	Размеры Материал (Длина x Ширина x Высота) мм	Материал Изделия мм	Нормативный объем миллилитры мл	Средняя масса г	Среднее давление мм рт.ст.	Тип защелки	Дополнительные параметры
130	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	100	6	Винтовой	2, б; 5
131	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	300	6	Винтовой	2, б; 5
132	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	500	6	Винтовой	2, б; 5
133	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.	240 x 135	35	500	100	6	Сдвижной	2, в; 5
134	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.	240 x 135	35	500	300	6	Сдвижной	2, в; 5
135	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.	240 x 135	35	500	500	6	Сдвижной	2, в; 5
136	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	240 x 135	35	500	100	6	Сдвижной	2, в; 5
137	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	240 x 135	35	500	300	6	Сдвижной	2, в; 5

№	Наименование изделия и его основные характеристики	Размеры изделия (Длина x Ширина x Высота)	Материал корпуса	Максимальная емкость изделия, мл	Длина шланга, см	Диаметр шланга, мм	Тип защелки	Дополнительные характеристики
138	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	240 x 135	35	500	500	6	Сдвижной	2, в; 5
139	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	100	6	Сдвижной	2, в; 5
140	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	300	6	Сдвижной	2, в; 5
141	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.	280 x 135	45	750	500	6	Сдвижной	2, в; 5
142	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	280 x 135	22	750	100	6	Сдвижной	2, в; 5
143	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	300	6	Сдвижной	2, в; 5
144	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	280 x 135	45	750	500	6	Сдвижной	2, в; 5
145	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	100	6	Сдвижной	2, в; 5

№	Наименование варианта исполнения мочеприемника	Размеры мешка (Высота x Ширина), мм	Масса, г, не более	Номинальный объем мешка, мл	Длина приводной трубки, мм	Внешний диаметр трубки, мм	Тип клапана сливного крана	№ рисунка
146	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	300	6	Сдвижной	2, в; 5
147	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.	310 x 150	50	1000	500	6	Сдвижной	2, в; 5
148	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	100	6	Сдвижной	2, в; 5
149	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	300	6	Сдвижной	2, в; 5
150	Мочеприемник одноразовый нестерильный ИН-ТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	310 x 150	50	1000	500	6	Сдвижной	2, в; 5

5.1.4 Основные размеры и масса принадлежностей соответствуют значениям, указанным в таблице 2. Допускаемое отклонение размеров $\pm 10\%$.

5.1.5 Конструкция и внешний вид принадлежностей соответствуют рисунку 6, 7 и таблице 2 настоящего документа. Допускаемое отклонение размеров $\pm 10\%$.

Таблица 2 – Основные размеры и масса принадлежностей

№	Наименование принадлежности	Размеры, мм	Масса, г, не более	№ рисунка
1	Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного	(Длина x Ширина x Толщина) 95 x 58 x 4	3	6, а
2	Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного	(Длина x Ширина x Толщина) 165 x 85 x 10	20	6, б

Наименование изделия/компонента		Размеры, мм	Кол-во, шт.	Примечание
		Размеры штырьков (длина x диаметр) 10 x 5 Внутренний диаметр колец 37		
3	Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного	(Длина x Ширина x толщина) 310 x 9 x 4 (Минимальный диаметр охвата) 5 (Максимальный диаметр охвата) 80 (Толщина)	3	6, в
4	Ремень для крепления мочеприемника носимого	(Длина x Ширина x Толщина) 500 x 20 x 1 (Максимальный диаметр охвата) 240	5	7, а
5	Завязка для крепления мочеприемника носимого	(Длина x Ширина x Толщина) 600 x 8 x 0,5	1	7, б

5.1.6 Требования к размерам частей мочеприемника. Допускаемое отклонение размеров $\pm 10\%$.

5.1.6.1 Толщина стенки прозрачного мешка мочеприемника 90 мкм, непрозрачного 100 мкм.

5.1.6.2 Размеры коннектора типа «елочка»: длина 38 мм, диаметр кончика 6 мм, диаметр основания 13 мм.

5.1.6.3 Размеры защитного колпачка коннектора типа «елочка»: длина 40 мм, диаметр кончика 12 мм, диаметр основания 14 мм.

5.1.6.4 Длина коннектора типа «елочка» с защитным колпачком: 40 мм.

5.1.6.5 Габаритные размеры сливного крана (Т-образный клапан) в закрытом виде (с учетом части в мешке) – 82 x 41 x 11 мм;

сливного крана (винтовой клапан) в закрытом виде (с учетом части в мешке) – длина 69 мм, диаметр 16 мм;

сливного крана (сдвижной клапан) в закрытом виде (с учетом части в мешке) – длина 50 мм, диаметр 13 мм.

5.1.7 Ремень для крепления мочеприемника носимого имеет прорези (перфорацию) длиной 6 мм, шагом 8 мм и двухстороннюю кнопку диаметром 12 мм, позволяющие регулировать изделие в соответствии с анатомическими особенностями пациента. Допускаемое отклонение $\pm 10\%$.

5.1.8 Ремень для крепления мочеприемника носимого имеет относительное удлинение не менее 20% при приложенной нагрузке 30 ± 1 Н.

5.1.9 Поверхностная плотность ремня для крепления мочеприемника носимого не менее 120 г/м².

5.1.10 Разрывная нагрузка ремня для крепления мочеприемника носимого не менее 55 Н.

5.1.11 Разрывная нагрузка стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного не менее 60 Н.

5.1.12 Мочеприемник без нагрузки с закрытым сливным краном (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан, при наличии) герметичен (не протекает).

5.1.13 Мочеприемник с нагрузкой в соответствии с ISO 8669-2 (сжатие двумя параллельными пластинами) с закрытым сливным краном (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан, при наличии) герметичен (не протекает).

5.1.14 Мочеприемник под воздействием удара в соответствии с ISO 8669-2 (падение на гладкую твердую поверхность) с закрытым сливным краном (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан, при наличии) герметичен (не протекает).

5.1.15 Мешок мочеприемника при полном заполнении жидкостью герметичен – отсутствуют протечки в швах и местах соединений в течение 48 ч.

5.1.16 Соединительные элементы мочеприемника (соединения: приводная трубка-мешок, сливной кран-мешок (при наличии) выдерживают нагрузку при растяжении 40±1 Н в течение 70 с.

5.1.17 Отверстия / прорези для крепления мочеприемника выдерживают 1,5 объема мешка мочеприемника в течение 24 ч.

5.1.18 Жидкость начинает поступать в мочеприемник в течение 1 мин. Минимальная скорость наполнения мочеприемника 10 мл/с.

5.1.19 Время опорожнения мешка мочеприемника при полностью открытом сливном кране (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан): не более 8 мин.

5.1.20 Прозрачный / непрозрачный мешок мочеприемника позволяет видеть без специальных устройств уровень заполнения жидкостью.

5.1.21 Приводная трубка в месте соединения с мешком мочеприемника имеет противозвратный клапан, предотвращающий обратный ток жидкости. Обратный ток жидкости не превышает 10 мл/мин.

5.1.22 Сливной кран (Т-образный клапан / винтовой клапан / сливной клапан) обеспечивает регулирование потока жидкости от полного перекрытия до струйного течения.

5.1.23 Поверхности мочеприемника чистые, без посторонних включений, механических повреждений и других дефектов, острые кромки отсутствуют.

5.1.24 Приводная трубка мочеприемника не имеет перегибов, сужений и слипшихся участков, препятствующих нормальному течению (току) жидкости.

5.1.25 Все мешки и камеры имеют шкалу с четкой градуировкой.

5.1.26 Срок годности мочеприемника – 3 года с даты его изготовления.

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ВСТУПАЮЩИХ В НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ КОНТАКТ С ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА

5.3 ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА

5.3.1 Материалы и сырье, применяемые при изготовлении мочеприемника, соответствуют требованиям действующих стандартов или нормативно-технической документации на эти материалы и сырье, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

5.3.2 Входной контроль сырья и материалов, применяемых при производстве мочеприемника, проводится в соответствии с требованиями сертифицированной и эффективно используемой системы менеджмента качества, внедренной у изготовителя.

5.3.3 Для изготовления мочеприемника, его частей используются сырье и материалы согласно таблице 3.

Таблица 3 – Сырье, материалы для изготовления мочеприемника, его частей

№	Наименование сырья, его код	Наименование, марка материала, количество
1		- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным крапом (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.

	Наименование изделия, его состав	Наименование, марка материала
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.	
1.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
1.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
1.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
1.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
1.5	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
1.6	Сливной кран (Т-образный клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (СРР) прозрачный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
2		- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.

	Наименование изделия, его частей	Наименование, марка материала, наименование производителя
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	
2.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
2.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
2.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
2.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
2.5	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
2.6	Сливной кран (Т-образный клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (СРР) прозрачный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
3		- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.

№	Наименование изделия, его тип, код	Наименование, марка, наименование, страна
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.	
3.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
3.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
3.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plas-tic Co., Ltd., Китай
3.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plas-tic Co., Ltd., Китай
3.5	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
3.6	Сливной кран (винтовой клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plas-tic Co., Ltd., Китай
		Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (СРР) прозрач-ный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
4		- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.

	Наименование изделия, его код	Наименование, марка материала, изготовитель
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра-ном (винтовой клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	
4.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
4.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
4.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plas-tic Co., Ltd., Китай
4.4	Кольпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plas-tic Co., Ltd., Китай
4.5	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
4.6	Сливной кран (винтовой клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plas-tic Co., Ltd., Китай
		Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (CPP) прозрач-ный марки GETTEL, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай

		Материал
5	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным кра- ном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.	
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.	
5.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
5.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
5.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plas- tic Co., Ltd., Китай
5.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plas- tic Co., Ltd., Китай
5.5	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай

	Наименование изделия, его параметры	Материал изделия, страна происхождения
5.6	Сливной кран (сдвижной клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
6	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.	
6.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
6.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
6.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай

	Наименование изделия	Материал, наименование производителя
6.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
6.5	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
6.6	Сливной кран (сдвижной клапан)	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
		Поливинилхлорид марки SC-12 White, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.	
7.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
7.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
7.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
7.5	Мешок прозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-02, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
8	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.	

	Наименование изделия, его состав	Наименование, марка материала, изготовителя
	- Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный. - Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.	
8.1	Противовозвратный клапан	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
8.2	Приводная трубка	Поливинилхлорид марки SG5, Yangzhou Shuangyang Medical Plastic Co., Ltd., Китай
8.3	Коннектор типа «елочка»	Поливинилхлорид марки SC-06, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
8.4	Колпачок коннектора типа «елочка»	Полиэтилен марки PE 100 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
8.5	Мешок непрозрачный	Поливинилхлорид марки YY-PVC-05, Nantong Dahai Plastic Co., Ltd., Китай
9	Принадлежности:	
9.1	Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного	Полипропилен неориентированный (CPP) марки YQT PP, Huaian Chengyi Plastic Co., Ltd., Китай
9.2	Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного	Поливинилхлорид марки SC-33 Blue, Suzhou Jianmin Plastic Co., Ltd., Китай
9.3	Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного	Полипропилен неориентированный (CPP) марки YQT PP, Huaian Chengyi Plastic Co., Ltd., Китай Краситель синий марки CHING LEUNG Blue, Ching Leung Hi-tech (Suzhou) Co., Ltd., Китай
9.4	Ремень для крепления мочеприемника носимого	Эластан марки 1120D, Guangdong Shitelong Industrial Co., Ltd., Китай
		Полипропилен неориентированный (CPP) марки A-06, Changzhou Ruikang Plastic Products Co., Ltd., Китай
9.5	Завязка для крепления мочеприемника носимого	Хлопок марки SA700, Lanxi Langhui Ribbon Co., Ltd., Китай
10	Упаковка:	
10.1	Индивидуальная потребительская упаковка	Полиэтилен марки L-7042, Huaian Zu-An Industry Trade Co., Ltd., Китай
10.2	Групповая потребительская упаковка	Полиэтилен марки L-7042, Huaian Zu-An Industry Trade Co., Ltd., Китай
10.3	Транспортная упаковка	Картон марки FP094, Huaian Tiancheng Carton Factory Co., Ltd., Китай

5.4 КОМПЛЕКТАЦИЯ**Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®****1. Варианты исполнения:**

1. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
2. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
3. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
4. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
5. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
6. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
7. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
8. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
9. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
10. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
11. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
12. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
13. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
14. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
15. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
16. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
17. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
18. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
19. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (Т-образный клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.

- 114

60. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
61. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
62. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
63. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
64. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
65. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
66. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
67. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
68. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
69. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
70. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
71. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
72. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный со сливным краном (сдвижной клапан), объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
73. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
74. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
75. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
76. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
77. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
78. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
79. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, прозрачный.

80. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
81. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
82. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
83. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
84. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 1500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
85. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, прозрачный.
86. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, прозрачный.
87. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, прозрачный.
88. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
89. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
90. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2000 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
91. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, прозрачный.
92. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, прозрачный.
93. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, прозрачный.
94. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 90 см, непрозрачный.
95. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 120 см, непрозрачный.
96. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® прикроватный без сливного крана, объем 2500 мл, трубка 150 см, непрозрачный.
97. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 10 см, прозрачный.
98. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 30 см, прозрачный.
99. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (Т-образный клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, прозрачный.
100. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным

120. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (винтовой клапан), объем 500 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

- 118

краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, прозрачный.

142. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 10 см, непрозрачный.

143. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 30 см, непрозрачный.

144. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 750 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

145. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, прозрачный.

146. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, прозрачный.

147. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, прозрачный.

148. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 10 см, непрозрачный.

149. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 30 см, непрозрачный.

150. Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® носимый со сливным краном (сдвижной клапан), объем 1000 мл, трубка 50 см, непрозрачный.

II. Принадлежности:

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного – не более 50 шт.
- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного - не более 50 шт.
- Ремень для крепления мочеприемника носимого - не более 50 шт.
- Завязка для крепления мочеприемника носимого - не более 50 шт.

III. Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную тару).

5.5 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

5.5.1 Маркировка достоверная, четкая, легко читаемая. Требования к символам в соответствии с ISO 15223-1:2021.

5.5.2 Каждый мочеприемник упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом. Ширина сплошного сварного шва не менее 1 мм.

5.5.3 Габаритные размеры индивидуальной потребительской упаковки (Длина x Ширина): 240 x 140 мм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм.

5.5.4 Мочеприемник в индивидуальной потребительской упаковке одного варианта исполнения в количестве не более 10 шт. упаковывается в групповую потребительскую упаковку – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом. Ширина сплошного сварного шва не менее 1 мм.

5.5.5 Габаритные размеры групповой потребительской упаковки (Длина x Ширина): 330 x 230 мм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм.

5.5.6 Принадлежности в количестве не более 50 шт. упаковывается в групповую потребительскую упаковку – пакет из пленки полиэтиленовой, края которого герметично сварены термическим способом. Ширина сплошного сварного шва не менее 1 мм.

5.5.7 Габаритные размеры групповой потребительской упаковки принадлежностей, не более (Длина x Ширина): 330 x 230 мм. Допускаемое отклонение размеров должно быть $\pm 10\%$. Толщина (плотность) пленки полиэтиленовой, не менее: 20 мкм.

5.5.8 Мочеприемник в групповой потребительской упаковке в количестве не более 25 шт. вместе с инструкцией по применению укладывается в транспортную тару – коробку из гофрированного картона.

5.5.9 Габаритные размеры картонной коробки (Длина x Ширина x Высота): 560 x 400 x 250 мм, с допускаемым отклонением ± 20 мм. Толщина (плотность) картонной коробки, не менее: 2500 мкм. Масса картонной коробки, не более: 2 кг. Масса транспортной упаковки с изделием должна быть не более 20 кг.

5.5.10 Сведения о материалах, из которых изготавливаются индивидуальная потребительская, групповая потребительская и транспортная упаковки мочеприемника, представлены в таблице 3.

5.5.11 Упаковка обеспечивает защиту содержимого от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

5.5.12 На переднюю сторону мешка мочеприемника нанесена следующая информация:

- горизонтальная градуировка (шкала) в зависимости от объема мешка мочеприемника (см. п. 5.1 настоящего документа);
- слова «APPROXIMATE CM³» или «APPROX. CM³» («Приблизительный объем в см³ (мл)»)

5.5.13 На индивидуальной потребительской упаковке мочеприемника прикреплена маркировка (рисунок 8, а), содержащая следующую информацию:

- полное наименование изделия, его вариант исполнения
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес



- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак
- дату изготовления
- код партии
- символ «Использовать до»
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»
- символ «Номер по каталогу»
- символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»
- символ «Запрет на повторное применение»
- символ «Не стерильно»
- символ «Не содержит натуральный латекс»
- символ «Температурный диапазон»
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»
- номер и дату регистрационного удостоверения



(год/месяц)



(код)



(год/месяц)



5.5.14 На групповой потребительской упаковке мочеприемника прикреплена маркировка (рисунок 8, б), содержащая следующую информацию:

- полное наименование изделия, его вариант исполнения
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак
- дату изготовления
- код партии



(год/месяц)



(код)

- количество изделий в упаковке

(шт.)

- символ «Использовать до»



(год/месяц)

- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»



- символ «Номер по каталогу»



- символ «Запрет на повторное применение»



- символ «Не стерильно»



- символ «Не содержит натуральный латекс»



- символ «Температурный диапазон»



- символ «Не допускать воздействия солнечного света»



- номер и дату регистрационного удостоверения



**МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ИНТРАЛОНО**

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОНО прикроватный со сливным каналом (Т-образный клапан), объем 1000 мл, трубка 90 см, прозрачный

 Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. (Хуайань Сити Тяньи Медицинский Инструмент Ко., Лтд.), No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone, Huaian City, 223003, Jiangsu, China (Китай)

Уполномоченный представитель в РФ:
АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 197022, г. Санкт-Петербург, ин.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, пом. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

 MM.YYYY г.

 MM.YYYY г.







 XXXX

 NT1000.90.0-P








РУ: № РЗН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

а 2)

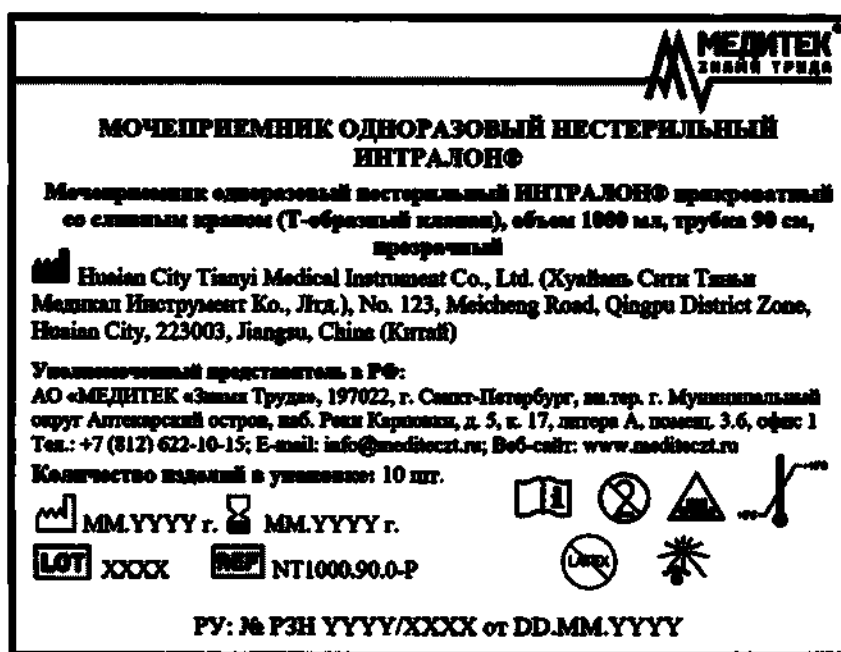


6

2) Рисунок 8 – Проект маркировки, расположенной на потребительской упаковке мочеприемника, где: а – Проект маркировки индивидуальной потребительской упаковки мочеприемника; б – Проект маркировки групповой потребительской упаковки мочеприемника

5.5.15 На групповой потребительской упаковке принадлежностей для крепления мочеприемника прикреплена маркировка (рисунок 9), содержащая следующую информацию:

- полное наименование принадлежности
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак
- дату изготовления
- код партии
- количество изделий в упаковке
- символ «Использовать до»
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»
- символ «Номер по каталогу»

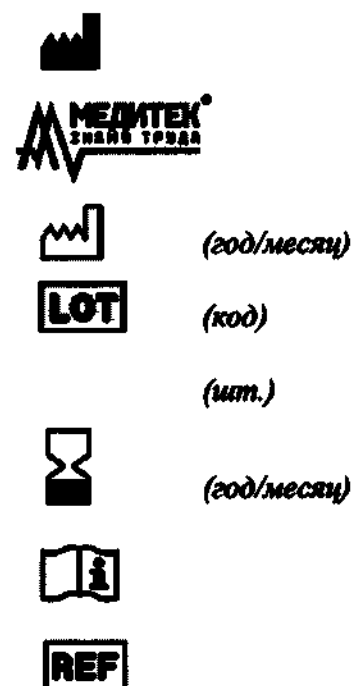

- символ «Не стерильно»



- символ «Температурный диапазон»



- символ «Не допускать воздействия солнечного света»



- номер и дату регистрационного удостоверения



**КРЮЧОК-ВЕШАЛКА ОДИНАРНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
МОЧЕПРИЕМНИКА ПРИКРОВАТНОГО**

Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. (Хуайань Сити Тяньи
Медикал Инструмент Ко., Лтд.), No. 123, Meicheng Road, Qingpu District Zone,
Huaian City, 223003, Jiangsu, China (Китай)

Уполномоченный представитель в РФ:
АО «МЕДИТЕК «Знания Труд», 197022, г. Санкт-Петербург, ин.тер. г. Муниципальный
округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru
Количество изделий в упаковке: 10 шт.

 MM.YYYY г.
  MM.YYYY г.

 XXXX
  N001-P





РУ: № РЗН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

Рисунок 9 – Проект маркировки, расположенной на групповой потребительской упаковке принадлежностей для крепления мочеприемника

5.5.16 Транспортная маркировка нанесена на бумажные ярлыки, ярлыки прикреплены к упаковке клеем.

5.5.16.1 На боковую сторону транспортной тары нанесена маркировка (рисунок 10), содержащая следующую информацию:

- полное наименование изделия
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес
- наименование уполномоченного представителя в РФ, его адрес, телефон, e-mail, веб-сайт и товарный знак
- дата изготовления



(год/месяц)

- | | | |
|--|---|-------------|
| - код партии |  | (код) |
| - количество изделий в упаковке | | (шт.) |
| - символ «Использовать до» |  | (год/месяц) |
| - символ «Температурный диапазон» |  | |
| - символ «Не допускать воздействия солнечного света» |  | |
| - символ «Не допускать воздействия влаги» |  | |
| - номер и дата регистрационного удостоверения | | |
| - полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузо-получателя и грузоотправителя | | |
| - наименование пункта назначения и пункта отправления | | |
| - надписи транспортных организаций (содержание надписей и порядок нанесения должны устанавливаться правилами транспортных министерств) | | |
| - массы брутто и нетто грузового места (кг) | | |
| - габаритные размеры грузового места (Длина x Ширина x Высота (мм)) | | |



МУЧЕПРЕМЕНИК ОДНОРАЗОВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ ИНТРАЛОЖИ

Грузоотправитель:
 Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd. (Xuyuan City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.), No. 123, Meichang Road, Qingshi District Zone, Huaian City, 223003, Jiangsu, China (Korea)

Уполномоченный представитель в РФ:
 АО «МЕДИТЕК» «Знаки Труд», 197022, г. Санкт-Петербург, кв. 109, г. Муниципальный округ Адмиралский остров, наб. Рокс Карпинки, п. 5, п. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
 Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditek.ru; Web-site: www.meditek.ru

Грузополучатель: XXXXXXXX

Адрес отправителя: No. 123, Meichang Road, Qingshi District Zone, Huaian City, 223003, Jiangsu, China (Korea)

Адрес получателя: XXXXXXXX

Масса брутто: XX кг.
Масса нетто: XX кг.
Габаритные размеры грузовой массы: 300 x 400 x 250 мм.
Количество изделий в упаковке: XX шт.

 MM.YYYY г.
  MM.YYYY г.
 XXXX





РУ: № РЭН YYYY/XXXX от DD.MM.YYYY

Рисунок 10 – Проект маркировки, расположенной на боковой стороне транспортной тары

5.6 ПОЯСНЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИМВОЛОВ

5.6.1 Объяснение предупреждающих и информационных символов, используемых на индивидуальной потребительской упаковке мочеприемника, групповой потребительской упаковке мочеприемника и принадлежностей для крепления мочеприемника, а также на транспортной упаковке, приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Расшифровка предупреждающих и информационных символов

Символ	Объяснение	Место нанесения маркировки
	Дата, когда было изготовлено медицинское изделие	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Наименование и адрес предприятия-изготовителя	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Товарный знак уполномоченного представителя в РФ (АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»)	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка
	Не использовать при повреждении упаковки и обращении к инструкции по применению. Указывает, что в случае повреждения упаковки нельзя использовать медицинское изделие	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
	Запрет на повторное применение. Указывает, что медицинское изделие предназначено для единичного использования, или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
	Изделие не содержит натурального латекса	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника
		Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника
		Групповая потребительская упаковка мочеприемника

Символ	Обозначение	Место нанесения маркировки
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде. Перед использованием прочтите инструкцию по применению и следуйте ее указаниям	Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
	Дата, после истечения которой изделие не должно использоваться	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника Транспортная упаковка
	Номер медицинского изделия по каталогу изготовителя	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
	Изделие не стерильно и не подвергалось стерилизации	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
	Не допускать воздействия влаги. Необходимость защиты изделия от воздействия влаги	Транспортная упаковка
	Беречь от солнечных лучей. Указывает, что изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника Транспортная упаковка
	Температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется	Индивидуальная потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка мочеприемника Групповая потребительская упаковка принадлежностей для крепления мочеприемника
		Транспортная упаковка

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Мочеприемник соответствует требованиям токсикологической, санитарно-химической и биологической безопасности в соответствии с требованиями серии стандартов ISO 10993, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

7.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 **Внимание!** Для предотвращения причинения травм пациенту / медицинскому персоналу перед началом эксплуатации мочеприемника необходимо изучить и неукоснительно соблюдать предусмотренные правила техники безопасности.

Перед тем как подготовить мочеприемник к работе, убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют требованиям настоящей инструкции по применению:

- Температура воздуха: от плюс 10 до плюс 35°C.
- Относительная влажность воздуха: до 80% при 25°C.
- Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

 После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать мочеприемник в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем или его уполномоченным представителем в РФ. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством мочеприемника.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния мочеприемника, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к изготовителю или к его уполномоченному представителю в РФ.

 **Внимание!**

- Не допускается эксплуатация мочеприемника при наличии дефектов на поверхности изделия.

- Запрещается повторное использование мочеприемника.
- Запрещается использование одного мочеприемника для нескольких пациентов.
- Запрещается эксплуатация мочеприемника в случае повреждения каких-либо его частей, нарушения целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки.

 К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицин-

ского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

Пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций, предупреждений и указаний, изложенных в настоящей инструкции по применению, так как их несоблюдение может привести к нанесению вреда пациенту / медицинскому персоналу.

 **Внимание!** Не используйте мочеприемник для сбора анализа мочи. Результаты анализа мочи могут быть недостоверными ввиду нестерильности изделия, что, как следствие, затруднит постановку правильного диагноза и проведение адекватного лечения.

Примечание: Выбор варианта исполнения мочеприемника зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей пациента. При этом от качества изготовления мочеприемника зависит здоровье его пользователя, а также здоровье медицинского персонала.

7.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Произведите антисептику кожи рук и/или наденьте средства индивидуальной защиты рук – перчатки.
- Аккуратно извлеките мочеприемник из упаковки.
- Предварительно проверьте целостность индивидуальной потребительской упаковки и мочеприемника, а также его срок годности.

 **Внимание!** Перед каждым использованием всегда проверяйте мочеприемник на предмет механических повреждений, обесцвечивания и посторонних включений. Эксплуатация мочеприемника не допускается в случае повреждения каких-либо его частей, повреждения индивидуальной потребительской упаковки, нарушения ее целостности (герметичности). Не используйте мочеприемник после истечения его срока годности.

7.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

7.3.1 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ ПРИКРОВАТНЫМ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ (ДРЕНИРУЕМЫМ, ОТКРЫТОГО ТИПА)

- Убедитесь в том, что сливной кран (клапан) закрыт. Если нет, то закройте.
- Закрепите мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) в вертикальном положении на кровати пациента или придвижной стойке / штативе на соответствующей высоте, чтобы обеспечить свободный поток мочи. Фиксацию мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) осуществляйте с помощью принадлежностей, таких как:
 - крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного;
 - держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного;
 - стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

 **Внимание!** Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного.

Примечание: Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря. Для оптимального оттока мочи мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) необходимо размещать ниже уровня кровати.

- При использовании крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, а) вставьте его полукруглый крючок в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа), при этом полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного зафиксируйте (повесьте) на кровати пациента или штативе (придвижной стойке). Приводную (подводящую) трубку закрепите в соответствующем «ушке» крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного во избежание ее перекручивания и перегибов, ухудшающих ток мочи.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) используется с двумя крючками-вешалками одинарными для крепления мочеприемника прикроватного.

- При использовании держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, б) вставьте два зубца (штырька), размещенные на краях изделия, в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа), при этом соедините два полукруглых крючка и зафиксируйте (повесьте) на кровати пациента или штативе (придвижной стойке). Приводную (подводящую) трубку закрепите в соответствующих «ушках» держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного во избежание ее перекручивания и перегибов, ухудшающих ток мочи.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) используется с одним держателем-подвесом для крепления мочеприемника прикроватного.

- При использовании стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, в) вставьте ее в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа). Для фиксации стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке) необходимо обернуть ее вокруг конструкции, вставить ее свободный конец в замок, произвести затяжку и фиксацию в специальном пазе механизма.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) используется с двумя стяжками разъемными для крепления мочеприемника прикроватного.

- Снимите защитный колпачок с универсального коннектора типа «елочка» на конце приводной трубки.

- Подсоедините коннектор типа «елочка» к урологическому катетеру или уропрезервативу.



Внимание!

- Старайтесь не касаться руками коннектора типа «елочка».

- Убедитесь, что катетер урологический или уропрезерватив и приводная трубка не перекручены и не загнуты, т. к. это может препятствовать оттоку мочи.

- Размещайте мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента, при этом обращайте внимание, чтобы приводная трубка не провисала с образованием петли, т.к. это создает угрозу застоя мочи и развития восходящей инфекции.

- Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) мочой.

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа), не предназначена для точного измерения количества жидкости.

- После заполнения мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) (когда объем жидкости в мочеприемнике прикроватном со сливным краном (дренируемом, открытого типа) достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мешка) опорожните его. Для опорожнения мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) направьте сливную трубку, расположенную в нижней части мешка мочеприемника прикроватного, в унитаз или какую-то другую емкость и откройте клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной) (рисунок 3 поз. 6-8):

- Переведите сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 3 поз. 6) крестообразного типа в открытое положение путем его сдвига в поперечном направлении. При совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) обеспечивается опорожнение мешка.

- Переведите сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 3 поз. 7) в открытое положение посредством сдвига вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающего про-

свет для движения жидкости. При необходимости для увеличения тока мочи из мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) осуществите несколько поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана.

- Переведите сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 3 поз. 8) в открытое положение посредством поворота внешнего элемента винтового механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости.

 **Внимание!** Не допускайте переполнения мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа).

- После опорожнения мешка мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) закройте клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной) (рисунок 3 поз. 6-8):

- Переведите сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 3 поз. 6) крестообразного типа в закрытое положение путем его сдвига в обратном поперечном направлении.

- Переведите сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 3 поз. 7) в закрытое положение посредством сдвига вверх внешнего элемента сдвижного механизма.

- Переведите сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 3 поз. 8) в закрытое положение посредством возвратного поворота внешнего элемента винтового механизма.

- Производите своевременную замену мочеприемника прикроватного со сливным краном (дренируемого, открытого типа) с последующей утилизацией (не рекомендуется использовать более 48 часов). По истечении рекомендованного времени отсоедините коннектор типа «елочка» от урологического катетера или уропрезерватива, снимите мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) с крючков-вешалок одинарных для крепления мочеприемника прикроватного / держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного или стяжек разъемных для крепления мочеприемника прикроватного и утилизируйте мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) в соответствии с п. 16 настоящего документа. При наличии загрязнений или визуального повреждения изделия мочеприемник прикроватный со сливным краном (дренируемый, открытого типа) также следует заменить на новый.

7.3.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ ПРИКРОВАТНЫМ БЕЗ СЛИВНОГО КРАНА (НЕДРЕНИРУЕМЫМ, ЗАКРЫТОГО ТИПА)

- Закрепите мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) в вертикальном положении на кровати пациента или придвижной стойке / штативе на соответствующей высоте, чтобы обеспечить свободный поток мочи. Фиксацию мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа) осуществляйте с помощью принадлежностей, таких как:

- крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного;
- держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного;

- стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.

 **Внимание!** Принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника прикроватного.

Примечание: Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря. Для оптимального оттока мочи мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) необходимо размещать ниже уровня кровати.

- При использовании крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, а) вставьте его полукруглый крючок в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа), при этом полуквадратный крючок для крепления мочеприемника прикроватного зафиксируйте (повесьте) на кровати пациента или штативе (придвижной стойке). Приводную (подводящую) трубку закрепите в соответствующем «ушке» крючка-вешалки одинарного для крепления мочеприемника прикроватного во избежание ее перекручивания и перегибов, ухудшающих ток мочи.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) используется с двумя крючками-вешалками одинарными для крепления мочеприемника прикроватного.

- При использовании держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, б) вставьте два зубца (штырька), размещенные на краях изделия, в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа), при этом соедините два полукруглых крючка и зафиксируйте (повесьте) на кровати пациента или штативе (придвижной стойке). Приводную (подводящую) трубку закрепите в соответствующих «ушках» держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного во избежание ее перекручивания и перегибов, ухудшающих ток мочи.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) используется с одним держателем-подвесом для крепления мочеприемника прикроватного.

- При использовании стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного (рисунок 6, в) вставьте ее в каждое отверстие, расположенное в верхней части мешка мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа). Для фиксации стяжки разъемной для крепления мочеприемника прикроватного на кровати пациента или штативе (придвижной стойке) необходимо обернуть ее вокруг конструкции, вставить ее свободный конец в замок, произвести затяжку и фиксацию в специальном пазе механизма.

Примечание: Один мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) используется с двумя стяжками разъемными для крепления мочеприемника прикроватного.

- Снимите защитный колпачок с универсального коннектора типа «елочка» на конце приводной трубки.



Внимание!

- Старайтесь не касаться руками коннектора типа «елочка».

- Убедитесь, что катетер урологический или уропрезерватив и приводная трубка не перекручены и не загнуты, т. к. это может препятствовать оттоку мочи.

- Размещайте мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента, при этом обращайте внимание, чтобы приводная трубка не провисала с образованием петли, т.к. это создает угрозу застоя мочи и развития восходящей инфекции.

- Подсоедините коннектор типа «елочка» к урологическому катетеру или уропрезервативу.

- Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа) мочой.

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа), не предназначена для точного измерения количества жидкости.

- Производите своевременную замену мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа) с последующей утилизацией (не рекомендуется использовать более 24 часов). После заполнения мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа) (когда объем жидкости в мочеприемнике прикроватном без сливного крана (недренируемом, закрытого типа) достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мешка) замените его на новый.



Внимание! Не допускайте переполнения мочеприемника прикроватного без сливного крана (недренируемого, закрытого типа).

- Отсоедините коннектор типа «елочка» от урологического катетера или уропрезерватива, снимите мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) с крючков-вешалок одинарных для крепления мочеприемника прикроватного / держателя-подвеса для крепления мочеприемника прикроватного или стяжек разъемных для крепления мочеприемника прикроватного и утилизируйте мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) в соответствии с п. 16 настоящего документа. При наличии загрязнений или визуального повреждения изделия мочеприемник прикроватный без сливного крана (недренируемый, закрытого типа) также следует заменить на новый.

7.3.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОЧЕПРИЕМНИКОМ НОСИМЫМ

- Убедитесь в том, что сливной кран (клапан) закрыт. Если нет, то закройте.
- Закрепите мочеприемник носимый в вертикальном положении на передней поверхности ноги (бедро или голени) на соответствующей высоте, чтобы обеспечить свободный поток мочи. Фиксацию мочеприемника носимого осуществляйте с помощью принадлежностей, таких как:

- ремень для крепления мочеприемника носимого;
- завязка для крепления мочеприемника носимого.

 **Внимание!** Принадлежности для крепления мочеприемника носимого не должны использоваться несколькими пациентами для предотвращения возможности перекрестного загрязнения. Для каждого пациента должны быть использованы новые принадлежности для крепления мочеприемника носимого.

Примечание: Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря.

- При использовании ремня для крепления мочеприемника носимого (рисунок 7, а) вставьте его в прорези, расположенные в верхней и/или нижней части(-ях) мешка мочеприемника носимого: по одной штуке в две прорези. Плотность прилегания эластичного ремня для крепления мочеприемника носимого регулируется изменением положения двухсторонней кнопки на перфорированной по всей длине ленте.

Примечание: Один мочеприемник носимый используется с одним или двумя ремнями для крепления мочеприемника носимого.

- При использовании завязки для крепления мочеприемника носимого (рисунок 7, б) вставьте ее в прорези, расположенные в верхней и/или нижней части(-ях) мешка мочеприемника носимого: по одной штуке в каждую прорезь или по одной штуке в две прорези аналогично способу фиксации с помощью ремня для крепления мочеприемника носимого. Плотность прилегания эластичной завязки для крепления мочеприемника носимого регулируется посредством завязывания узла и/или банта.

Примечание: Один мочеприемник носимый используется с одной, двумя, тремя или четырьмя завязками для крепления мочеприемника носимого.

- Снимите защитный колпачок с универсального коннектора типа «елочка» на конце приводной трубки.

- Подсоедините коннектор типа «елочка» к урологическому катетеру или уропрезервативу.



Внимание!

- Старайтесь не касаться руками коннектора типа «елочка».

- Убедитесь, что катетер урологический или уропрезерватив и приводная трубка не перекручены и не загнуты, т. к. это может препятствовать оттоку мочи.
- Размещайте мочеприемник в удобном и надежном положении для пациента, при этом обращайтесь внимание, чтобы приводная трубка не провисала с образованием петли, т.к. это создает угрозу застоя мочи и развития восходящей инфекции.
- Используйте шкалу на передней поверхности мешка для считывания показаний заполнения мочеприемника носимого мочой.

Примечание: Градуировка (шкала), расположенная на передней стороне мешка мочеприемника носимого не предназначена для точного измерения количества жидкости.

- После заполнения мочеприемника носимого (когда объем жидкости в мочеприемнике носимом достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мешка) опорожните его. Для опорожнения мешка мочеприемника носимого направьте сливную трубку, расположенную в нижней части мешка мочеприемника носимого, в унитаз или какую-то другую емкость и откройте клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной) (рисунок 5 поз. 6-8):

- Переведите сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 5 поз. 6) крестообразного типа в открытое положение путем его сдвига в поперечном направлении. При совпадении отверстия в клапан с просветом выводной трубки мочеприемника носимого обеспечивается опорожнение мешка.

- Переведите сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 5 поз. 7) в открытое положение посредством сдвига вниз внешнего элемента сдвижного механизма, обеспечивающего просвет для движения жидкости. При необходимости для увеличения тока мочи из мочеприемника носимого осуществите несколько поступательно-возвратных движений механизма сдвижного клапана.

- Переведите сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 5 поз. 8) в открытое положение посредством поворота внешнего элемента винтового механизма, обеспечивающим просвет для движения жидкости.



Внимание! Не допускайте переполнения мочеприемника носимого.

Примечание: Мочеприемник носимый следует опорожнять до того, как он достигнет максимальной степени наполнения. Если мочеприемник носимый будет полон, то он станет некомфортным в использовании и начнет оказывать давление на урологический катетер или уропрезерватив.

- После опорожнения мешка мочеприемника носимого закройте клапан определенной конфигурации (Т-образный / винтовой / сдвижной) (рисунок 5 поз. 6-8):
- Переведите сливной кран (Т-образный клапан) (рисунок 5 поз. 6) крестообразного типа в закрытое положение путем его сдвига в обратном поперечном направлении.

- Переведите сливной кран (сдвижной клапан) (рисунок 5 поз. 7) в закрытое положение посредством сдвига вверх внешнего элемента сдвижного механизма.
- Переведите сливной кран (винтовой клапан) (рисунок 5 поз. 8) в закрытое положение посредством возвратного поворота внешнего элемента винтового механизма.
- Производите своевременную замену мочеприемника носимого с последующей утилизацией (не рекомендуется использовать более 48 часов). По истечении рекомендованного времени отсоедините коннектор типа «елочка» от урологического катетера или уропрезерватива, освободите мочеприемник носимый от ремня(-ей) для крепления мочеприемника носимого или завязки(-ок) для крепления мочеприемника носимого и утилизируйте мочеприемник носимый в соответствии с п. 16 настоящего документа. При наличии загрязнений или визуального повреждения изделия мочеприемник носимый также следует заменить на новый.

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование мочеприемника должно осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией по применению.

8.2 К эксплуатации мочеприемника допускается специально обученный и аттестованный медицинский персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению указанных в настоящем документе работ, обладающий знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющий основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

Также к эксплуатации мочеприемника допускаются «компетентные» взрослые, прошедшие соответствующую подготовку под руководством квалифицированного медицинского работника, обладающего знаниями в области урологии, сестринского дела, владеющего основными общеврачебными и специальными навыками оказания медицинской помощи, и/или детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

8.3 Учитывайте информацию, полученную из предупредительных знаков, и соблюдайте меры предосторожности при использовании мочеприемника.

8.4 Перед тем как подготовить мочеприемник к работе, убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют требованиям настоящей инструкции по применению:

- Температура воздуха: от плюс 10 до плюс 35°C.
- Относительная влажность воздуха: до 80% при 25°C.
- Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

8.5 Мочеприемник относится к изделиям одноразового использования, предназначен для индивидуального применения. Использованное изделие повторному применению не подлежит.

8.6 Не используйте мочеприемник, если целостность (герметичность) индивидуальной потребительской упаковки нарушена.

8.7 Принадлежности для крепления мочеприемника относятся к изделиям многократного использования, предназначены для индивидуального применения.

8.8 После длительного пребывания в условиях отрицательных температур необходимо выдержать мочеприемник в транспортной упаковке не менее 4 часов в условиях нормальной (комнатной) температуры.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

9.1 Мочеприемник в процессе эксплуатации не подлежит техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту. После использования мочеприемник подлежит утилизации. Повторное использование запрещено.

9.2 При наличии видимых загрязнений на принадлежностях для крепления мочеприемника их следует заменить на новые.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование изделия в транспортной упаковке может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением условий и требований, установленных и действующих на соответствующих видах транспорта: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при 25°C.

10.2 Условия хранения мочеприемника в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя): в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями (закрытых отапливаемых помещениях): при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при 25°C.

10.3 Хранение мочеприемника должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в хорошо вентилируемом помещении, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЖИВОТНЫХ

11.1 Исследования на животных не проводились.

**12 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ**

12.1 Мочеприемник не содержит материалов животного или человеческого происхождения.

**13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

13.1 Мочеприемник не содержит лекарственных средств для медицинского применения и фармацевтических субстанций.

14 СВЕДЕНИЯ О СТЕРИЛИЗАЦИИ

14.1 Данное требование не применимо, так как мочеприемник не является стерильным и не должен подвергаться стерилизации.

15 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКИМИ, НО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМБИНАЦИИ С ЗАЯВЛЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

15.1 Принадлежности:

- Крючок-вешалка одинарный для крепления мочеприемника прикроватного.
- Держатель-подвес для крепления мочеприемника прикроватного.
- Стяжка разъемная для крепления мочеприемника прикроватного.
- Ремень для крепления мочеприемника носимого.
- Завязка для крепления мочеприемника носимого.

15.2 Изделия, не являющиеся медицинскими, но предусмотренные для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием, отсутствуют.

15.3 Медицинские изделия для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием:

- катетер урологический стерильный, в т.ч. катетер урологический мужской наружный стерильный / нестерильный (уропрезерватив).

15.3.1 Медицинские изделия для использования в комбинации с мочеприемником должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий или других предусмотренных документов и должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

16 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

16.1 Мочеприемник необходимо утилизировать наиболее безопасным способом в соответствии с нормами местного законодательства по утилизации медицинских отходов.

16.1.1 Утилизация мочеприемника на территории РФ должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

16.1.2 Согласно СанПиН 2.1.3684-21 мочеприемник после использования по назначению (изделие, контактировавшее с биологическими жидкостями) относится к классу Б – эпидемиологически опасные отходы; неиспользованное изделие (изделие, не контактировавшее с биологическими жидкостями) относится к классу А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам, в случаях истечения его срока годности (хранения) и/или нарушения целостности (герметичности) индивидуальной потребительской упаковки и/или наличия повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.



Внимание! Перед утилизацией мочеприемник необходимо опорожнить.

16.1.3 Сбор использованных мочеприемников (отходов класса Б) в условиях ЛПУ должен осуществляться работниками организации в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющую желтую маркировку (упаковку для отходов класса Б). Перед утилизацией медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Выбор метода обеззараживания (обезвреживания) определяется исходя из возможностей организации, осуществляющей медицинскую деятельность, и определяется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами, разработанной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации. В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую деятельность, участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории, медицинские отходы класса Б обеззараживаются (обезвреживаются) работниками данной организации в местах их образования.

16.1.4 Сбор использованных мочеприемников (отходов класса Б) в домашних условиях

должен осуществляться в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или в упаковку, имеющую желтую маркировку (упаковку для отходов класса Б). Перед утилизацией медицинские отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (обезвреживанию), дезинфекции в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Обеззараженные мочеприемники в специальной упаковке должны быть переданы в специализированную компанию по утилизации медицинских отходов, в том числе медицинских отходов класса Б.

16.2 Утилизация производится в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®

Вариант исполнения _____

Код партии _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

18 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®

Вариант исполнения _____

Код партии _____

упакован на предприятии-изготовителе Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.
(Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи) (дата)

19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя или уполномоченного представителя в РФ представляются при несоответствии поставляемого изделия, его упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации, в течение 60 дней со дня поставки изделия.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем или уполномоченным представителем в РФ и содержать сведения о принятых мерах. Сведения о рекламациях фиксируются в таблице 5.

Срок рассмотрения рекламации изготовителем или уполномоченным представителем в РФ – 1 (один) месяц со дня получения рекламации.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин несоответствия поставляемого изделия, его упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, вариант исполнения и код партии изделия;
- дата получения изделия с предприятия-изготовителя или от уполномоченного представителя в РФ и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание несоответствия;
- предполагаемая причина непригодности изделия к эксплуатации;
- наименование поврежденных частей изделия и т.д.

Предприятие-изготовитель или уполномоченный представитель в РФ принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

Таблица 5 – Сведения о рекламациях

№ п/п	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица

20 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

20.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия: Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН® заявленным в документации показателям качества и характеристикам при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего срока годности изделия.

20.2 Изготовитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия.

Изготовитель не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых стерилизации или повторной обработке, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации изготовителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

20.3 Гарантийный срок хранения мочеприемника – 3 года с даты изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае если изделие не соответствует требованиям, приведенным в Выписке из технического файла на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®, в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции по применению и исчисляется с даты его изготовления. При обнаружении несоответствия изделия требованиям, приведенным в Выписке из технического файла на медицинское изделие Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®, покупателю гарантируется обмен на аналогичный товар надлежащего качества в течение гарантийного срока.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

– Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

– Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

– Несовпадения кода партии изделия с гарантийным талоном.

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Мочеприемник одноразовый нестерильный ИНТРАЛОН®

Вариант исполнения _____

Код партии _____

Приобретен _____
(дата, подпись и печать покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)

21 ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ

Серия документов	Обозначение национального (или международного) стандарта (документа) в стране изготовителя	Наименование стандарта (документа)
Этикетка / Инструкция по применению	ISO 15223-1:2021	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
	EN 1041:2019	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
Биологический контроль	Серия стандартов ISO 10993	Оценка биологического действия медицинских изделий
Частные стандарты	ISO 8669-2:1996 (GB/T 17257.2:2009)	Мочеприемники. Часть 2. Требования и методы испытаний

СВИДЕТЕЛЬСТВО



**КССМТ (Китайский совет по содействию
международной торговле)**



**Китайский совет по содействию международной
торговле**

**Тшеченая печать: Сертификация
Китайский совет по содействию международной торговле * 66**

**Китайский совет по содействию международной торговле
Международная торговая палата Китая**

КССМТ (Китайский совет по
содействию международной торговле)

Китайский совет по содействию международной торговле
Международная торговая палата Китая

/QR-код/
№ 243208B0/000762

СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО печать компании Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд. (Huaiian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Насладная печать: СЕРТИФИКАЦИЯ

Китайский совет по содействию международной торговле * 66

Печать (2 шт.):

«СЕРТИФИКАЦИЯ / КССМТ /
Китайский совет по содействию
международной торговле» * 66

Китайский совет по содействию
международной торговле

Уполномоченное лицо: /подпись/
Чжао Вэйлу

Дата: 22.10.2024
(Дата: 22 октября 2024 г.)

Сайт для проверки свидетельства: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Утверждено Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.
(Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.)
Генеральный директор

/Подпись/ Хуан Ин
Подпись и печать

22.10.2024

Печать: Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.
(Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.)

Инструкция по применению на медицинское изделие

МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ ИНТРАЛОН®

Версия документа	Описание	Дата
1.1	Начальная версия	02.07.2024
1.2	Версия 1.2	22.10.2024

Хуайань Сити Тяньи Медикал Инструмент Ко., Лтд.

(Huaian City Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.)

/Текст документа на русском языке/

-----Конец перевода документа-----

Я, переводчик Федотов Андрей Юрьевич, владеющий русским, английским и китайским языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Федотов Андрей Юрьевич

Российская Федерация, Санкт-Петербург.

Двадцать пятого октября две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Шаяхметов Дамир Фаритович, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Оболенцевой Ольги Вячеславовны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Федотова Андрея Юрьевича. Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за №78/342-н/78-2024 - 9-1440

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб.



Д.Ф.ШАЯХМЕТОВ



Итого в настоящем документе
159 (Сто пятьдесят девять) листов
Вн. ш
НОТАРИУСА:

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать восьмого октября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Кузнецова Екатерина Владимировна, временно исполняющая обязанности
нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Оленевой Елены Николаевны
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/357-н/78-2024-23-448.

Уплачено за совершение нотариального действия: 14400 руб. 00 коп.



Е.В. Кузнецова



Прошито и скреплено печатью 160 (сто шестьдесят) листов.

Е.В. Кузнецова