


~~ОКПД2 32.50.50.190~~
ОКПД2 32.50.30.119

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МП Электра»

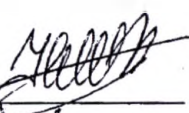


Н.Н. Матвеев

«*27*» *ноября* 2022 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол инструментальный из нержавеющей стали
для операционных и перевязочных

СИх-«ЭЛЕКТРА»

в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022

МПЭЛ.942819.008РП

2022 г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

- | Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Назначение и область применения медицинского изделия

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на *Столы инструментальные из нержавеющей стали для операционных и перевязочных СИх-«ЭЛЕКТРА» в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022* (далее по тексту – столы, изделия), предназначенные для размещения медицинского инструмента, медицинских приборов, перевязочного материала в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации. Область применения – хирургия.

Изделия должны применяться в больницах, клиниках, госпиталях и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом.

Столы изготавливаются в различных исполнениях, представленных в Таблице 1.

Столы могут оборудоваться колесными (рис. 1) или регулируемыми опорами (рис. 2).

Расшифровка номера модели стола:

Модель СИх-«ЭЛЕКТРА»-06.21

Данная цифра определяет размер полок
(см. таблицу)

Данная цифра определяет количество полок
(1 - одна полка, 2 - две полки)

Данная цифра определяет тип опор
(1 - колесная опора, 2 - регулируемая опора)

Столы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Класс в зависимости от потенциального риска применения 1 по Приказу МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.

Столы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 16371-2014 и ТУ 32.50.30-008-39548518-2022.

Комплект поставки «Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных СИх-«ЭЛЕКТРА» в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022» должен соответствовать приведенному в Приложении А.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Име. № инв. №
Име. № инв. №	Подп. и дата

2	008P22-21	28.06.21
Дата		

МПЭЛ.942819.008РП

Лист

3

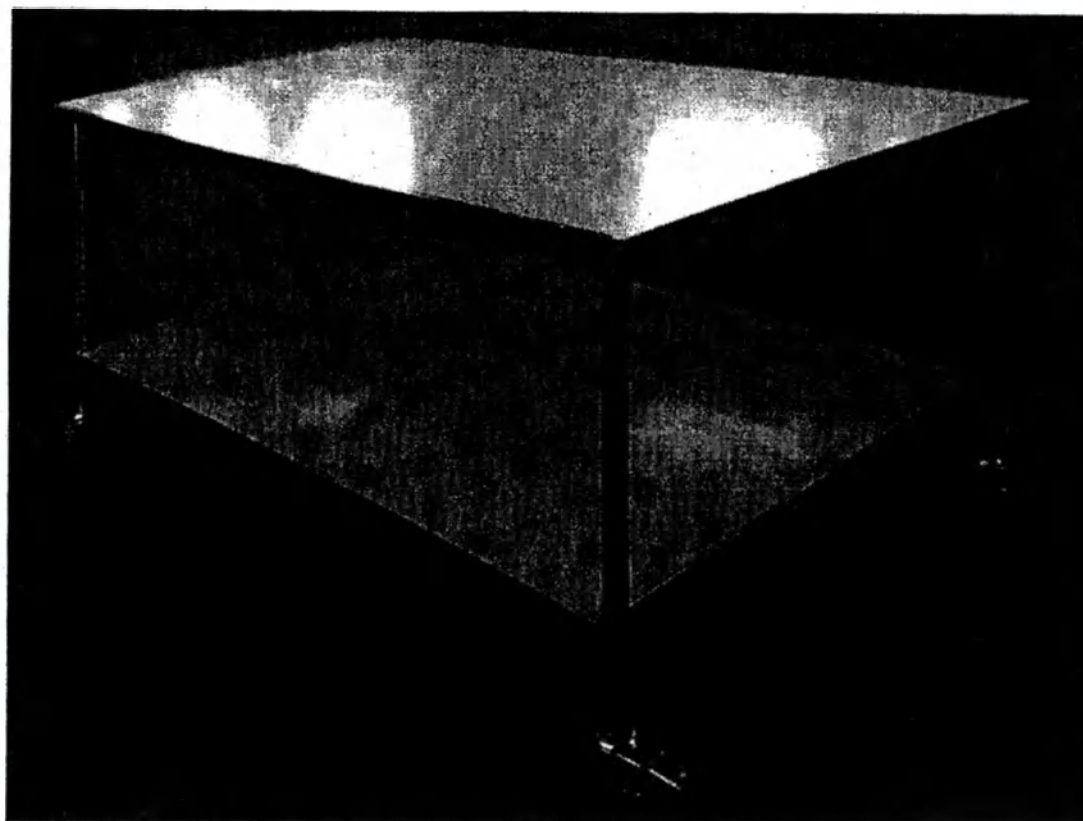


Рис. 1 - Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-06.21 (общий вид)

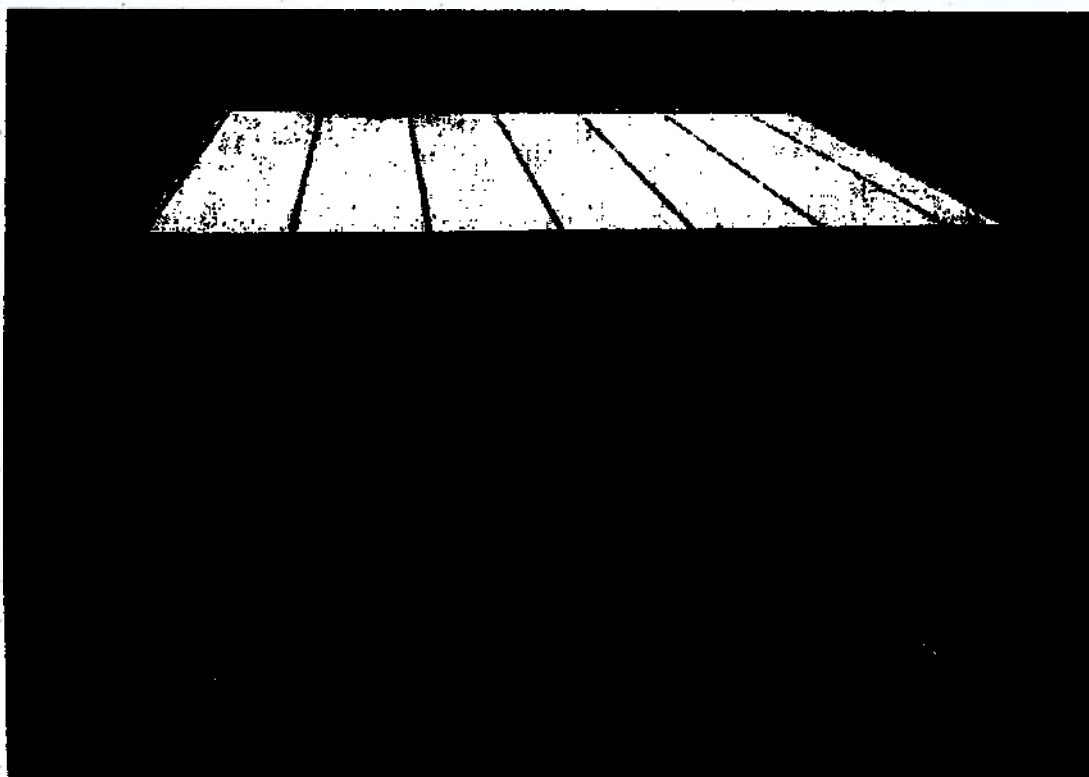


Рис. 2 - Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-03.11 (общий вид)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

1 008РП.1-23

Рис. 1/2.04.25

МПЭЛ:942819.008РП

Лист

4

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры и масса

Таблица 1

№ п/п	Наименование модели	<i>Длина Ширина</i>		Высота мм	Масса кг	Масса с доп. полкой, кг
		Ширина мм	Глубина мм			
1	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА» -01	800	600	850	16	25
2	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-02	800	700	850	17	27,5
3	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-03	800	800	850	18	30
4	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-04	1000	600	850	18	28
5	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-05	1000	700	850	19	30,5
6	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-06	1000	800	850	20	33
7	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-07	1200	600	850	19,5	31,5
8	Столик инструментальный СИх-«Электра»-08	1200	700	850	20,7	34,3
9	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-09	1200	800	850	22	37
10	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-10	1400	600	850	22	36
11	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-11	1400	700	850	23,7	39
12	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-12	1400	800	850	25,5	42
13	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-13	1600	600	850	25	40
14	Стол инструментальный СИх-«ЭЛЕКТРА»-14	1600	700	850	26	42

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

2 2 008РП.2-24 97.06.24

МПЭЛ.942819.008РП

Лист

5

Продолжение таблицы 1

Длина Ширина

№ п/п	Наименование модели	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Масса кг	Масса с доп. полкой, кг
15	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-15	1600	800	850	27	44
16	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-16	1800	600	850	30	47,5
17	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-17	1800	700	850	31,7	51,3
18	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-18	1800	800	850	33,5	55
19	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-19	2000	600	850	32	50
20	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-20	2000	700	850	33,5	54
21	Стол инструментальный СИХ-«ЭЛЕКТРА»-21	2000	800	850	35	58

Допустимая абсолютная погрешность размеров ± 4 мм.

Допустимая относительная погрешность массы $\pm 5\%$

2.2 Расстояние от верхней полки до каркаса, позволяющего разместить дополнительную

полку - 600 мм

2.3 Типы применяемых опор:

- колёсные $\varnothing 75 \times M10$;
- винтовые регулируемые $\varnothing 31 \times M10$

2.3 Номинальная нагрузка на полки - 20 кг.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

№ подл

3 Показания и противопоказания и к применению медицинского изделия

3.1 Показания

Предназначены для размещения медицинского инструмента, медицинских приборов, перевязочного материала в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации.

3.2 Противопоказания

3.2.1 Запрещается использовать изделия в других целях.

3.3 Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Отсутствуют.

3.4 Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Противопоказаний к взаимодействию с другими медицинскими изделиями нет.

4 Подготовка к работе

Распакуйте стол и очистите его от упаковочного материала и защитной плёнки. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию стола дезинфекционными средствами, утвержденными в установленном порядке.

5 Порядок работы с изделием

5.1 Стол представляет собой каркас, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагаются полки (одна или две в зависимости от модели), выполненные из листовой зеркальной нержавеющей, стали.

Столы оснащены колесными или винтовыми регулируемыми опорами.

5.2 Стол поставляется в собранном виде.

Стол на колёсных опорах после подготовки к работе готов к эксплуатации.

Стол, оснащённый регулируемыми опорами, необходимо выставить в горизонтальное положение вращая нижнюю часть опоры до устранения зазора с полом.

5.3 Рекомендуются размещать медицинские изделия равномерно по поверхности полок.

5.4 При взаимодействии с поверхностью стола необходимо использование перчаток.

6. Информация о порядке обработки медицинского изделия для его повторного использования

6.1 После применения необходимо очистить загрязнённые места тканевой салфеткой, смоченной в растворе моющего средства.

6.2 Наружные поверхности изделия подлежат дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644.

6.3. Изделия подлежат дезинфекции после каждого применения.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3		008РП.3-24	Руса	04.11.2019	МПЭЛ.942819.008РП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

7. Указания по техническому обслуживанию и ремонту.

7.1 Техническое обслуживание

Таблица 2

Объём работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения стола на колёсных опорах	Усилие, необходимое для перемещения столов на колёсных опорах с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать 100 Н (10 кгс). Проверяют динамометром по ГОСТ 13837-79

7.2 Ремонт

Таблица 3

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт колёсных опор	Ослаб винт, соединяющий колёсную опору с ножкой стола.	Подтянуть винт 1 (см. рис. 4)
Усилия, прилагаемые для перемещения стола на колёсных опорах превышают установленную норму или одно из колес вращается с заметным усилием	Выработка (разрушение) подшипника колёсной опоры	Заменить колёсную опору на новую, отвинтив винт 1 (см. рис. 4)

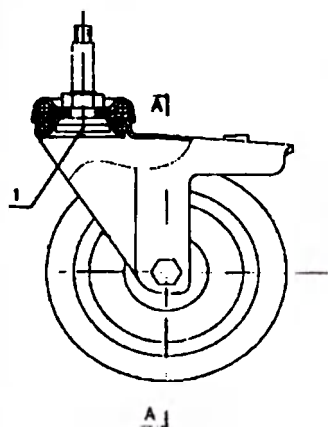


Рис. 4 Схема колёсной опоры.

Ремонт и техническое обслуживание проводится специалистами ЛПУ, прошедшими обучение и имеющими допуск к данному виду деятельности.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
3	008AP.3-24	Руче	08.11.24	МПЭЛ.942819.008РП	8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

8. Порядок утилизации и уничтожения

8.1 Транспортная тара утилизируется как медицинские отходы класса А (бытовые отходы, в соответствии с нормативными документами, установленными в медицинском учреждении).

8.2 Столы по окончании срока службы утилизируются как отходы класса А, в соответствии с нормативными документами, установленными в медицинском учреждении.

8.3 Столы, используемые в операционных и перевязочных, по окончании срока службы и обеззараживания утилизируются как отходы класса А, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и нормативными документами, установленными в медицинском учреждении.

9. Срок службы, условия транспортирования и хранения

9.1 Средний срок службы стола должен быть 8 лет.

9.2 Транспортировка столов может осуществляться любыми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 до + 50 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

9.3 Хранение у потребителя (поставщика) должно производиться при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

9.4 Столы при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150 (+10°С до +35°С и относительной влажности 80% при 25°С (без конденсации)).

10. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Столы не содержат лекарственные средства и материалы животного и (или) человеческого происхождения.

11. Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия в течение всего срока годности требованиям национальных стандартов и документации производителя при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения, установленных настоящим руководством.

Изготовитель **не несет ответственности** за причиненный вред, который был нанесен самостоятельной модернизацией или неквалифицированным использованием изделия.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

11.3 Гарантийный срок хранения изделия – 1 год с даты выпуска.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	МПЭЛ.942819.008РП	Лист
							9

12 Сведения о производителе медицинских изделий:

Наименование - ООО «МП ЭЛЕКТРА»

Адрес места нахождения – 117208, Москва, Сумской пр., д. 12, кор.1, кв.192

Телефон - +7(495)22-33-836

e-mail: mail@mp-electra.ru

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

3	Лист	008РП.3-24	Подпись	Дата	МПЭЛ.942819.008РП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9А

13. Свидетельство о приемке

Столик инструментальный из нержавеющей стали для операционной и перевязочной модели СИХ-«Электра» - ____ - ____, серийный номер _____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующих технических условий ТУ 32.50.30-008-39548518-2022 и признан годным к эксплуатации

« _____ » 20 ____ г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

14. Перечень применяемых нормативных документов

Таблица 4

Обозначение НД	Наименование
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Приложение А

**Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных
СИХ-«ЭЛЕКТРА» в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022:**

- [illegible]

[illegible]

12. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 12.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 12.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

13. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 13.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 13.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

14. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 14.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 14.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

15. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 15.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 15.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

16. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 16.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 16.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

17. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 17.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 17.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

18. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 18.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 18.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

19. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 19.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 19.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

20. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 20.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 20.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

21. Стол инструментальный с одной полкой на колесных опорах СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 21.11

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 21.11-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

22. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ—«ЭЛЕКТРА»-01.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 01.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

23. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ—«ЭЛЕКТРА»-02.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ —«ЭЛЕКТРА» - 02.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

24. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ—«ЭЛЕКТРА»-03.21

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист	Изм	№ докум	Подп.	Дата
2	008РП.2-24	РЧ	28.06.24	

МПЭЛ.942819.008РП

Лист

105

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 03.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

25. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-04.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 04.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

26. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-05.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 05.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

27. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-06.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 06.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

28. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-07.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 07.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

29. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-08.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 08.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

30. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-09.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 09.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

31. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-10.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 10.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

32. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-11.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 11.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

33. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-12.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 12.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

34. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-13.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 13.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

35. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-14.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 14.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

36. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-15.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 15.21-1шт.,

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

МПЭЛ.942819.008РП

10В

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

37. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-16.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 16.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

38. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-17.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 17.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

39. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-18.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 18.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

40. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-19.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 19.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

41. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-20.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 20.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

42. Стол инструментальный с двумя полками на колесных опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА»-21.21

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 21.21-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

43. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 01.12

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 01.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

44. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 02.12

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 02.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

45. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 03.12

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 03.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

46. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 04.12

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 04.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

47. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 05.12

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 05.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

48. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 06.12

в составе: 1. Стол Модель СИХ-«ЭЛЕКТРА» - 06.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лист 10Г				
МПЭЛ.942819.008РП				
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
2	208.01.2-24	208.01.2-24	208.01.2-24	208.01.2-24

в составе: 1. Стол Модель СИх — «ЭЛЕКТРА» - 07.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.:

50. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх - «ЭЛЕКТРА» - 08.12
в составе: 1. Стол Модель СИх - «ЭЛЕКТРА» - 08.12-1шт.,

2. *Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;*

51. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ - «ЭЛЕКТРА» - 09.12
в составе: 1. Стол Модель СИХ - «ЭЛЕКТРА» - 09.12-1шт.,

2. *Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.:*

52. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх - «ЭЛЕКТРА» - 10.12 в составе: 1. Стол Модель СИх - «ЭЛЕКТРА» - 10.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.:

53. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх-«ЭЛЕКТРА» - 11.12 в составе: 1. Стол Модель СИх-«ЭЛЕКТРА» - 11.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1 шт.:

54. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх - «ЭЛЕКТРА» - 12.12
в составе: 1. Стол Модель СИх - «ЭЛЕКТРА» - 12.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

55. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх -«ЭЛЕКТРА» - 13.12
в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 13.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

56. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ - «ЭЛЕКТРА» - 14.12
в составе: 1. Стол Модель СИХ - «ЭЛЕКТРА» - 14.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

57. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИХ -«ЭЛЕКТРА» - 15.12
в составе: 1. Стол Модель СИХ -«ЭЛЕКТРА» - 15.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

58. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх -«ЭЛЕКТРА» - 16.12
в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 16.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

59. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх-«ЭЛЕКТРА» - 17.12
в составе: 1. Стол Модель СИх-«ЭЛЕКТРА» - 17.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

60. Стол инструментальный с одной полкой на регулируемых опорах СИх -«ЭЛЕКТРА» - 18.12
в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 18.12-1шт.,

2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

- СИх -«ЭЛЕКТРА» - 10.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 10.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
74. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 11.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 11.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
75. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 12.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 12.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
76. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 13.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 13.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
77. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 14.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 14.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
78. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 15.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 15.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
79. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 16.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 16.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
80. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 17.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 17.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
81. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 18.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 18.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
82. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 19.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 19.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
83. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 20.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 20.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.;
84. Стол инструментальный с двумя полками на регулируемых опорах
СИх -«ЭЛЕКТРА» - 21.22 в составе: 1. Стол Модель СИх -«ЭЛЕКТРА» - 21.22-1шт.,
2. Руководство по эксплуатации (Паспорт)-1шт.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

МПЭЛ.942819.008РП

Лист

10Ж

Лист регистрации изменений

[illegible][illegible]



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 19
Гусаров О.А. (подпись)
ГЛАВН. И БУХГАЛТЕР
Доверенность №1
25.12.2023