

«Утверждаю»

Генеральный директор



А.В. Дёмшин

200__ г.

Инструкция по применению «Ножницы патологоанатомические секционные»

Ножницы патологоанатомические секционные предназначены для разрезания, отрезания или размельчения в процессе проведения патологоанатомических исследований в патологоанатомических и судебно-медицинских отделениях моргов.

Ножницы патологоанатомические секционные поставляются в модификациях, позволяющих выполнять весь необходимый комплекс манипуляций для разрезания, отрезания или размельчения при проведении патологоанатомических исследований.

Основными инструментами для разрезания, отрезания или размельчения являются ножницы хирургические, ножницы ревизионные, ножницы анатомические, ножницы мышечные по Mayo-Noble, ножницы костные, ножницы кишечные, ножницы для иссечения.

Ножницы хирургические имеют тупые концы лезвий и применяются для разрезания без повреждения тканей концами.

Ножницы ревизионные имеют один острый, другой тупой конец и применяются для разрезания с предварительным протыканием.

Ножницы анатомические имеют тупые концы лезвий и применяются для разрезания без повреждения тканей концами.

Ножницы мышечные по Mayo-Noble имеют тупые концы лезвий и применяются для разрезания без повреждения тканей концами.

Ножницы костные имеют острые концы и пружинную пластину между дужками.

Ножницы кишечные имеют длинное лезвие с нижним концом, имеющим утолщение препятствующее втыканию в ткань кишечника.

Ножницы для иссечения - ножницы с двумя острыми концами и дугообразными лезвиями.

Эксклюзивный представитель в России ООО «Тантек» (495)5063818 office@tantec.ru www.tantec.ru

Ножницы изготовлены из высокопрочной хромированной нержавеющей стали.

Форма ножниц разработана для максимально удобной работы.

Ваш инструмент прослужит долго:

Если вы будете регулярно следить за ним.

После каждого применения ножниц, их необходимо вымыть и тщательно высушить.

Недопустимо оставление ножниц в воде на длительное время - это сократит их срок службы.

Упаковка обеспечивает защиту ножниц от внешних воздействий при транспортировании и при погрузочно-разгрузочных работах.

Ножницы должны храниться в сухом чистом помещении, при комнатной температуре, по возможности быть защищены от коррозий и воздействия ультрафиолетовых излучений.

Эксклюзивный представитель в России ООО «Тантек» (495)5063818 office@tantec.ru www.tantec.ru