


ООО «ЗЕРЦ»

Набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ».

Инструкция по установке и эксплуатации

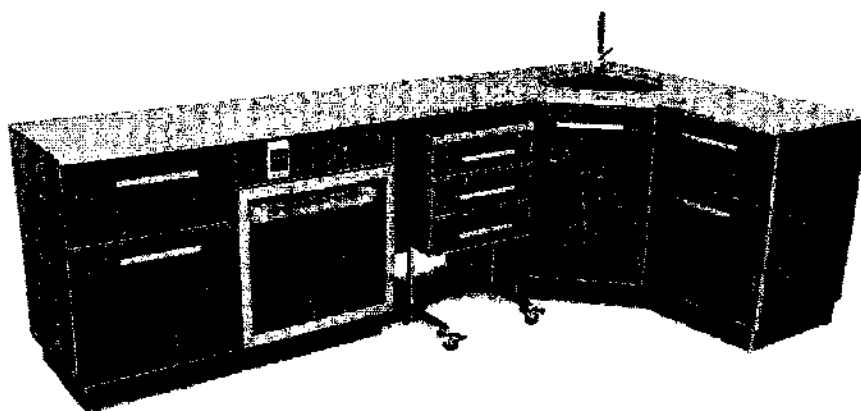

**Убедительно просим Вас во избежание недоразумений, до начала установки/эксплуатации
внимательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации!**

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

1. Характеристики

Настоящая инструкция распространяется на набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ». Набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» представляет собой набор унифицированной мебели, предназначенной для кабинетов врача, стоматологических и зуботехнических кабинетов, лабораторий, больниц, поликлиник, аптек, медицинских и учебных заведений.

Набор предназначен для размещения лекарственных средств, дезсредств, средств любого химического состава, не запрещенного для применения в медицине, документации, справочной литературы, одежды персонала, принадлежностей медицинского персонала и пациента, для размещения медицинских приборов и аппаратов, для стерилизации и хранения инструментов, для хранения перевязочных материалов, для размещения пациентов в смотровых, массажных, операционных кабинетах.

Конструктивное исполнение модулей набора мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» унифицировано типоразмерам, что обеспечивает размещение необходимого количества приборов и аппаратов около пациента.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

2. Рекомендации по установке

В большинстве случаев набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство ее применения.

Составные части мебели должны быть фиксированы между собой и к окружающим предметам в соответствии с действующими, общепринятыми предписаниями

При установке соблюдайте необходимые расстояния, для беспрепятственной работы с подвижными частями изделий (ящики, дверцы и т.д.)

Чтобы облегчить установку мебели необходимо:

- установить составные части мебели в той последовательности и на том месте, где предполагается ее использование;
- отрегулировать по высоте и в горизонтальной плоскости изделия, путем регулировки высоты опорных ножек под изделиями;
- совместить сопрягаемые отверстия на изделиях между собой;
- с помощью фиксирующих винтов соединить сопрягаемые изделия друг с другом;
- при необходимости зафиксировать изделия к стенам и потолку помещения с помощью анкерных болтов;
- при необходимости подсоединить изделия к системе водоснабжения и канализации.

3. Подключение электрических частей

Электрические блоки, входящие в набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» комплектуются 3-жильными кабелями питания со штепселем на конце. Вставьте штекер в розетку с параметрами сети 210 – 240 V, 50-60 Hz.

В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен изготовителем, его гарантийной службой или специалистом необходимой квалификации, для предотвращения повреждений электротоком. Перед использованием проверяйте надлежащее соединение проводов.

Меры предосторожности:

- Перед обработкой и очисткой изделий убедитесь, что штепсель питания вынут из розетки;
- Не трогайте штепсель изделия мокрыми руками. В противном случае это может привести к поражению электротоком;
- В тех случаях, когда неисправна розетка, шнур, штепсель питания, не эксплуатируйте изделие. В противном случае это может привести к короткому замыканию;
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания изделия;
- Не сгибайте, не тяните и не связывайте шнур питания изделия;
- Своевременно очищайте штепсель от пыли и других загрязнений.

4. Эксплуатация

набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» должен эксплуатироваться обученным медицинским персоналом.

Соблюдайте температурный режим эксплуатации медицинской мебели - от +5 до +50° С.

Для обеспечения длительного срока службы необходимо своевременно очищать элементы медицинской мебели от пыли, грязи и органических загрязнений.

Эксплуатация фурнитуры:

1. Не перегружайте створки дверей и ящики мебели дополнительной нагрузкой;
2. Не перегибайте створки дверей при открытии настежь
3. Избегайте ударов створок дверей и ящиков мебели об другие части мебели или предметы интерьера;
4. Не вставляйте дополнительные предметы в притвор между дверцей и корпусом;
5. Избегайте загрязнений элементов фурнитуры

Уход за фурнитурой

Для ухода за фурнитурой настоятельно рекомендуем использовать средства, не разрушающие защиту от коррозии, не содержащие кислоты и смолы.

Не менее одного раза в год смазывайте маслом все подвижные детали, замки и места запоров

Уход за пластиковыми поверхностями

Пластиковые поверхности мебели рекомендуется очищать специальными средствами для ПВХ, либо с помощью воды и обычного моющего средства.

Категорически запрещается:

1. Ставить раскаленные предметы на пластиковые поверхности мебели
2. Прислонять раскаленные предметы к пластиковым поверхностям мебели

5. Рекомендации и советы.

Не следует подсоединять к электрическим блокам мебели, какое-либо дополнительное оборудование, без письменного согласия производителя.

При проведении ремонтных работ медицинскую модульную мебель ЗЕРЦ рекомендуем защищать пленочным материалом от попадания на поверхность изделий растворов, штукатурных материалов и красок

При возникновении любых дополнительных вопросов обращайтесь к представителям производителя.

6. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание набора мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» должно осуществляться сертифицированными специалистами ООО «Зерц».

7. Гарантийный срок.

В течении гарантийного срока ООО ЗЕРЦ гарантирует качество изготовленных изделий согласно требованиям ГОСТ 15150, а также:

- Стабильность цвета рабочих поверхностей, пластика в процессе эксплуатации;
- Механическую целостность фурнитуры (ручек, петель, замков и т.д.);
- Целостность изделий.

Гарантийный срок исчисляется с даты ввода мебели в эксплуатацию, указанной в гарантийном талоне.

Гарантия распространяется:

- на изделия, входящие в состав набора мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ», при условии, что изделия эксплуатировались в соответствии с Правилами по уходу и эксплуатации;
- на монтажные работы, при условии, что установка изделий осуществляется специалистами, уполномоченными ООО «ЗЕРЦ»

Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные в результате нарушения Правил по уходу и эксплуатации;
- поврежденные в результате воздействия со стороны третьих лиц или вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (СТИХИЯ, ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ И Т.Д.);
- поврежденные в результате умышленных или ошибочных действий;
- поврежденные в результате деформации, возникшей по причине естественной усадки объекта, куда устанавливается медицинская мебель, и погрешностей, допущенных при строительстве;
- ремонт и замена деталей которых осуществлялась самостоятельно, либо предприятиями и частными лицами, не уполномоченными на это ООО «ЗЕРЦ».

Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, которые могли быть обнаружены при осмотре в момент получения изделий.

8. Утилизация.

Медицинская модульная мебель ЗЕРЦ подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими на территории, где производится утилизация.

9. Сертификация продукта.

Товар сертифицирован на территории России.

набор мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» изготавливают в исполнении УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий мебель медицинская модульная ЗЕРЦ относится к 1-ой группе, если изделия расположены на ножках, или ко 2-му и 3-му классу, если изделия расположены на колесиках по ГОСТ Р 50444 (см. таблицу 1).

В зависимости от потенциального риска применения набора мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» относятся к классу 1 по ГОСТ Р 51609.

В зависимости от возможных последствий отказа набора мебели медицинской модульной «ЗЕРЦ» относится к классу В по ГОСТ Р 50444.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕРЦ»

Адрес: Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 81

Телефон/факс: (495) 649-62-60

Электронная почта: zerts@zerts.ru