

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИННОРТО»
620091, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 11в, помещ. 48, офис 1,
тел. +7(922)236-21-81, e-mail: dbakanev@gmail.com
ОГРН 1226600046672, ИНН 6678122102, КПП 667801001
БИК 044525999, к/с 30101810845250000999, р/с 40702810401500141232
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Иннорто»

Д.А. Баканев

июля

2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ медицинского изделия

Орtez для грудного и поясничного отдела позвоночника «INNORTO» по ТУ
32.50.22-001-98981863-2022, в вариантах исполнения

г. Екатеринбург
2024 г.

1. Наименование медицинского изделия

Орtez для грудного и поясничного отдела позвоночника «INNORTO» по ТУ 32.50.22-001- 98981863 2022, варианты исполнения:

1. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», варианты исполнения:

1. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52201, типоразмеры: S, M, L, XL, XXI – 1 штука.
2. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62201, типоразмеры: S, M, L, XL, XXI – 1 штука.
3. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388336, типоразмеры: S, M, L, XL, XXI – 1 штука.
4. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388339, типоразмеры: S, M, L, XL, XXI – 1 штука.
5. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52200, типоразмеры: S, M, L, XL – 1 штука.
6. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62200, типоразмеры: S, M, L, XL – 1 штука.
7. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388348, типоразмеры: S, M, L, XL, XXI – 1 штука.
8. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52367, типоразмеры: M, L – 1 штука.
9. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52365, типоразмеры: M, L – 1 штука.
10. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62365, типоразмеры: M, L – 1 штука.
11. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52199, типоразмеры: S, M, L – 1 штука.
12. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62199, типоразмеры: S, M, L – 1 штука.
13. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52051, типоразмеры: M, L – 1 штука.
14. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52366, типоразмеры: M, L – 1 штука.
15. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388354, типоразмеры: S/M, L/XL – 1 штука.
16. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388357, типоразмеры: XS, S, M, L – 1 штука.
17. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388363, типоразмеры: M, L – 1 штука.
18. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388369, типоразмеры: M, L – 1 штука.
19. Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388375, типоразмер: универсальный – 1 штука.

II. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», варианты исполнения:

1. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52048, типоразмеры: L, XL – 1 штука.
2. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388294, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
3. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388295, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
4. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52181, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL – 1 штука.
5. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52382, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
6. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388267, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
7. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52396, типоразмеры: L, XL, XXL – 1 штука.
8. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52178, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
9. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52395, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
10. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52399, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
11. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52397, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
12. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388315, типоразмер: универсальный – 1 штука.
13. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52393, типоразмеры: S, M, L, XL – 1 штука.
14. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52383, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
15. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388282, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
16. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52394, типоразмеры: S, M, L, XL – 1 штука.
17. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52180, типоразмеры: S, M, L – 1 штука.
18. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388342, типоразмеры: S, M, L – 1 штука.
19. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52403, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
20. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52212, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
21. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52405, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
22. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52402, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
23. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52404, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.

24. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52406, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
25. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388264, типоразмеры: S, M, L, XL – 1 штука.
26. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388270, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
27. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388297, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
28. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388300, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
29. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388306, типоразмеры: M, L, XL, XXL – 1 штука.
30. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388318, типоразмеры: S, M, L, XL, XXL – 1 штука.
31. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52182, типоразмер: универсальный – 1 штука.
32. Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388333, типоразмеры: S/M, L/XL – 1 штука.

III. Инструкция по применению (к каждому ортезу) – 1 шт.

2. Производитель:

ООО «Иннорто»

620091, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 11В, ПОМЕЩ. 48, ОФИС 1.

Адрес места производства медицинского изделия:

«SHIJIAZHUANG RUNYI MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD.».

Китай, 2602, UNIT 2, COMMERCIAL OFFICE BUILDING, ZHONGHENG BUILDING, 28 JIANBEI STREET, CHANG'AN DISTRICT, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, P.R.C.

Телефоны для принятия претензий от потребителя:

+7(922)236-21-81.

3. Назначение

Медицинское изделие «Ортез для грудного и поясничного отдела позвоночника «INNORTO» по ТУ 32.50.22-001-98981863-2022, в вариантах исполнения» (далее по тексту изделие), предназначено для поддержки и иммобилизации деформаций, переломов, растяжений связок или растяжений позвоночника за счет полужесткой фиксации тела.

4. Область применения:

Ортопедия. Изделия применяются для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических и клинических учреждениях различного профиля, а также для домашнего применения

5. Потенциальный потребитель:

Пользователь/пациент без специальной подготовки (при индивидуальном/ самостоятельном использовании в лечебно-профилактических и клинических учреждениях различного профиля, а также для домашнего применения).

Медицинские изделия многоразового применения.

6. Условия применения


Рекомендуемая температура эксплуатации от +5 до +40 °С, и влажности 50-70 % при температуре 25 °С.

7. Основные технические характеристики

Таблица 1 – Технические характеристики

Показатель	Значение
Изменение линейных размеров после первой стирки (усадка), %	не более 20
Остаточная деформация изделий до и после стирки, %	не более 10
Поверхностная плотность, г/м ²	не менее 550
Разрывная нагрузка, Н (кгс)	не менее 147 (15)
Изменение значения разрывного удлинения после стирки, % (от значения разрывного удлинения до стирки)	не более 20


Артикул 52201

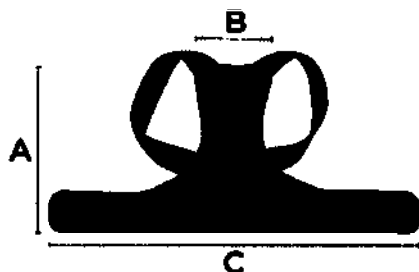

Размер	Длина, см					
	A	B	C	Обхват талии	Длина регулируемого ремня	
S	40±0,5	18±0,5	94±1	60-70	75±0,5	
M			99±1	70-83	86±0,5	
L		19±0,5	113±1	75-88	98±0,5	
XL	41±0,5		114±1	83-100	95±0,5	
XXL			123±1	95-110	98±0,5	

Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52201


Артикул 62201

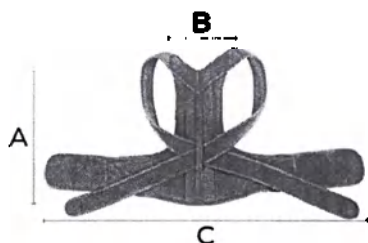

Размер	Длина, см					
	A	B	C	Обхват талии	Длина регулируемого ремня	
S	40±0,5	18±0,5	94±1	60-70	81±0,5	
M			99±1	70-83	96±0,5	
L		19±0,5	113±1	75-88	98±0,5	
XL	41±0,5		114±1	83-100	95±0,5	
XXL			123±1	95-110	98±0,5	

Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62201


Артикул 388336

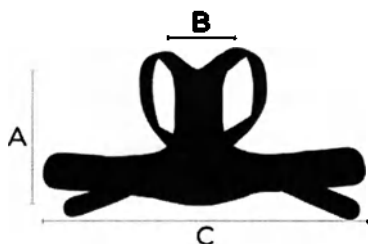

Размер	Длина, см					
	A	B	C	Обхват талии	Длина регулируемого ремня	
S	40±0,5	18±0,5	94±1	60-70	81±0,5	
M			99±1	70-83	86±0,5	
L		19±0,5	113±1	75-88	98±0,5	
XL	41±0,5		114±1	83-100	95±0,5	
XXL			123±1	95-110	98±0,5	

Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388336


Артикул 388339

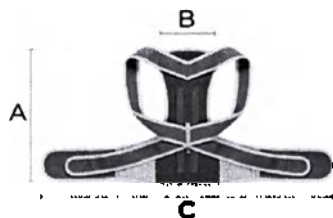

Размер	Длина, см					
	A	B	C	Обхват талии	Длина внешнего ремня	
S	40±0,5	18±0,5	94±1	60-70	81±0,5	
M			99±1	70-83	96±0,5	
L		19±0,5	113±1	75-88	98±0,5	
XL	41±0,5		114±1	83-100	95±0,5	
XXL			123±1	95-110	98±0,5	

Орtez для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388339


Артикул 52200

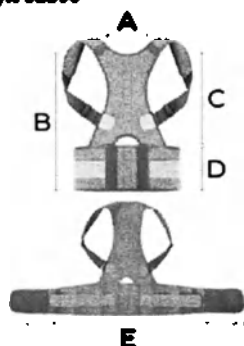

Размер	Длина, см							
	A	B	C	D	E	Обхват талии	Длина каждого ремня	
S	11±0,5	42±1	28±1	13±0,5	79±1	66-75	46±1	
M		38±1			89±1	75-85	50±1	
L	12±0,5	37±1	29±1		97±1	85-95	49±1	
XL	11±0,5				107±1	95-102	48±1	

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52200


Артикул 62200

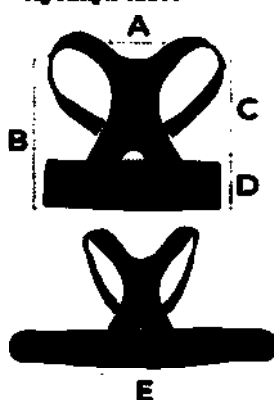

Размер	Длина, см							
	A	B	C	D	E	Обхват талии	Длина каждого ремня	
S	11±0,5	57±1	48±1	12±0,5	79±1	66-75	46±1	
M		53±1			88±1	75-85	50±1	
L	12±0,5	52±1	42±1		97±1	85-95	49±1	
XL	11±0,5				107±1	95-102	48±1	

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62200


Артикул 388348

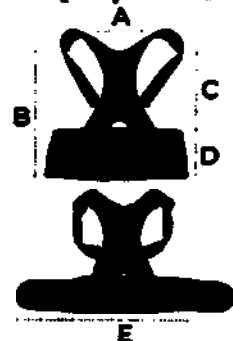

Размер	Длина, см						
	A	B	C	D	E	Обхват талии	Длина каждого ремня
S	11±0,5	57±1	41±1	12±0,5	79±1	66-75	46±1
M		53±1			89±1	75-85	50±1
L	12±0,5	52±1	42±1		97±1	85-95	49±1
XL	11±0,5				107±1	95-102	48±1
XXL		118±1	102-113	49±1			

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388348


Артикул 52367

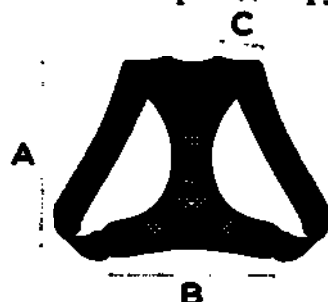

Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого ремня
M	22±1	23±0,5	5±0,5	47±1
L		23±0,5		57±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52365


Артикул 52365

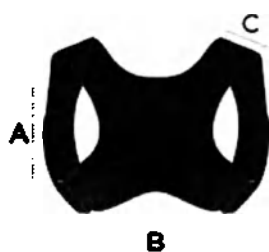

Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого ремня
M	14±0,5	20±0,5	5±0,5	57±1
L	15±0,5	22±0,5		58±1


Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62365

Артикул 62365

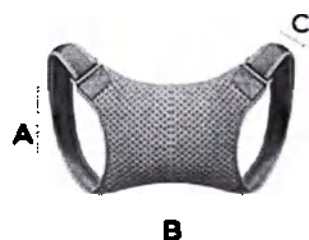

Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого ремня
M	14±0,5	18±0,5	4±0,5	55±1
L	15±0,5	22±0,5		59±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62365

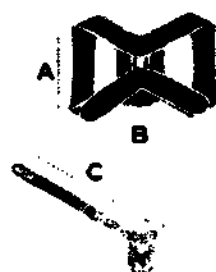


Артикул 52199

Размер	Длина, см		
	A	B	C
S	19±0,5	13±0,5	64±1
M			67±1
L			70±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52199

Артикул 62199

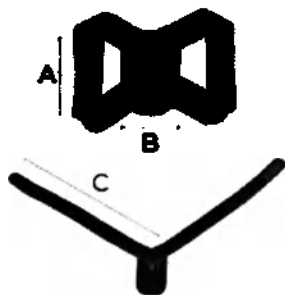

Размер	Длина, см		
	A	B	C
S	19±0,5	12±0,5	67±1
M			69±1
L			71±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 62199

Артикул 52051



Размер	Длина, см		
	A	B	Длина каждого ремня
M	19±0,5	6±0,5	90±1
L	28±0,5		100±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52051



Артикул 52366

Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого ремня
M	22±1	10±0,5	5±0,5	44±1
L				54±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52366

Артикул 388354



Размер	Длина, см			
	A	B	C	Общий вес
S/M	40±1	25±1	12±0,5	63-80
L/XL		100±1		80-95

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388354


Артикул 388357



Размер	Длина, см		
	A	B	Длина каждого внешнего ремня
XS	19±1	9±0,5	63±1
S			73±1
M			84±1
L			95±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388357


Артикул 388363

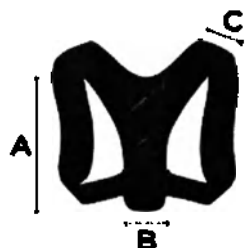

Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого внешнего ремня
M	19±1	7±0,5	5±0,5	93±1
L				107±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388363

Артикул 388369

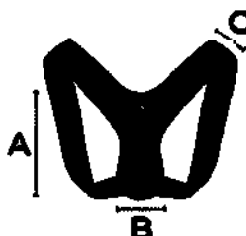

Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого внешнего ремня
M	19±1	8±0,5	6±0,5	87±1
L				96±1


Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388369

Артикул 388375




Размер	Длина, см			
	A	B	C	Длина каждого внешнего ремня
Универсальный	19±1	10±0,5	6±0,5	89±1

Ортез для грудного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388375

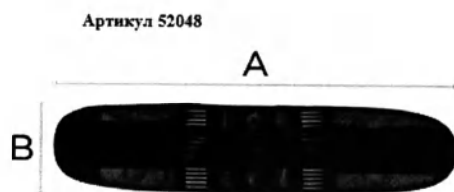


Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
L	35±1	19±0,5	60-95
XL	114±1	20±0,5	95-104

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52048

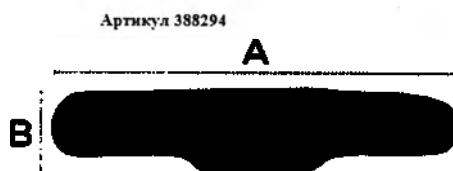


Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
M	90±2	22±1	75-85
L	100±2		85-95
XL	110±2		95-105
XXL	120±2		105-115

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388294

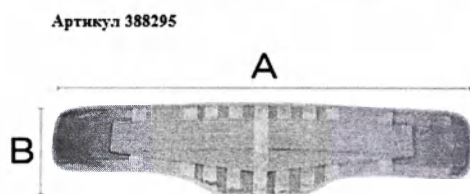


Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	90±2	22±1	75-85
M	100±2		85-95
L	110±2		95-105
XL	115±2		105-110
XXL	120±2		110-115

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388295

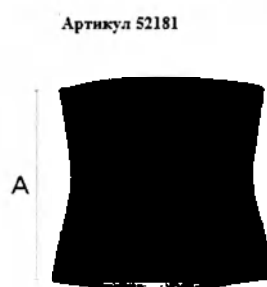

Размер	Длина, см	
	A	Обхват талии
S	27±1	70-73
M		74-77
L	24±1	78-81
XL		82-85
XXL		86-89
XXXL	25±1	90-93


Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52181

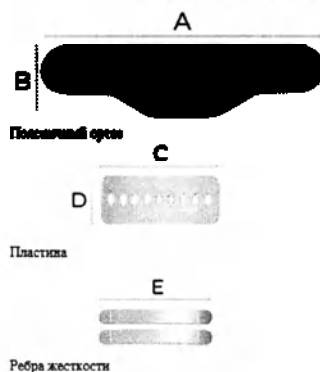

Размер	Длина, см											Обхват талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
M	89±1	24±0,5	20±0,5	8±0,5	19±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	67-82
L	97±1											75-90
XL	107±1											79-100
XXL	117±1											95-110

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52382


Артикул 388267

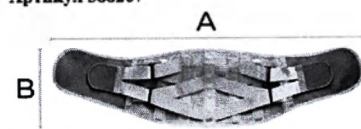

Поясничный ортез



Пластина

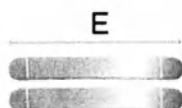


Ребра жесткости

Размер	Длина, см											Обхват талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
M	89±1	24±0,5	20±0,5	8±0,5	19±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	67-82
L	97±1											75-90
XL	107±1											79-100
XXL	117±1											95-110

F		H		J	
G		I		K	
Вставка с турмалином		Вставка с ворсом		Вставка-карман	

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388267

Артикул 52396

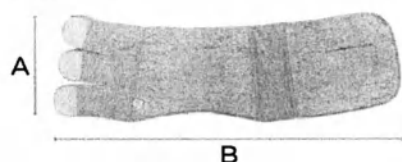


В

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
L	26±0,5	87±1	70-75
XL		92±1	75-80
XXL		99±1	80-90

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52396


Артикул 52178

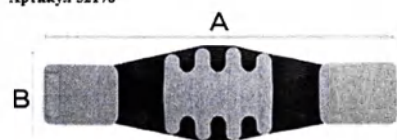

Поясничный ортез



Лента-стяжка

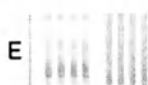

Ребра жесткости

Размер	Длина, см											Обхват талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
M	91±1	26±0,5	62±1	10±0,5	2×17,5 2×19,0 ±0,5	24±0,5	19±0,5	24±0,5	19±0,5	24±0,5	19±0,5	71-85
L	102±1		72±1									83-89
XL	109±1		74±1									90-103
XXL	120±1		91±1									100-115


F		H		J	
G		I		K	
Вставка с турмалином		Вставка с ворсом		Вставка-карман	

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52178

Артикул 52395




Абдоминальная часть

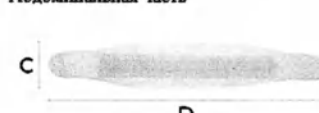

Тазобедренная часть

Размер	Длина, см				
	A	B	C	D	Обхват талии
M	26±0,5	82±1	16±0,5	83±1	60-75
L		90±1		88±1	75-80
XL		102±1		97±1	80-90
XXL		109±1		108±1	90-100


Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52395

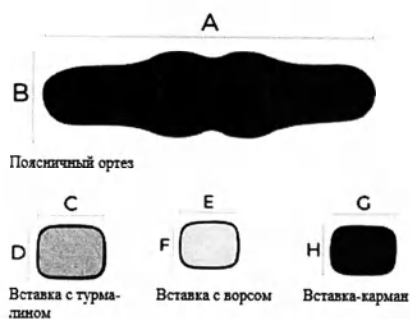

Размер	Длина, см								
	A	B	C	D	E	F	G	H	Обхват талии
M	89±1	23±0,5	24±0,5	19±0,5	24±0,5	19±0,5	24±0,5	19±0,5	60-73
L	99±1								74-90
XL	108±1								91-100
XXL	118±1								101-110


Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52399

Артикул 52397

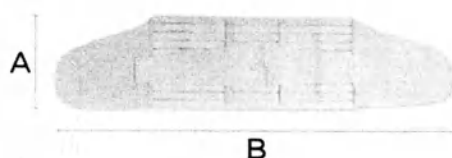

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
M	23±0,5	89±1	65-75
L		96±1	75-80
XL		99±1	80-90
XXL		104±1	90-100


Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52397

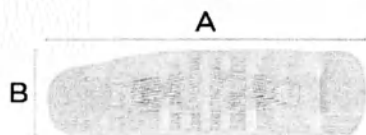

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
Универсальный	110±1	25±1	70-100


Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388315

Артикул 52393

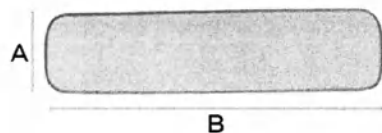

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	22±0,5	77±1	60-65
M		88±1	65-70
L		99±1	70-80
XL	21±0,5	109±1	80-90

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52393

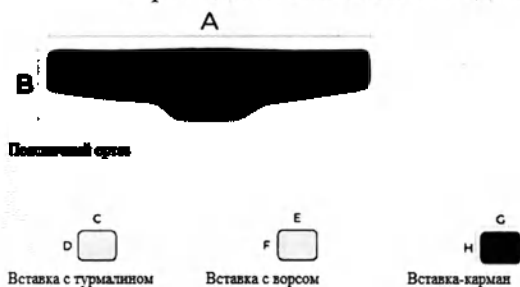

Размер	Длина, см								
	A	B	C	D	E	F	G	H	Обхват талии
M	89±1	20±1	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	70-82
L	100±1								80-93
XL	110±1								90-103
XXL	118±1								100-111


Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52383



Размер	Длина, см								
	A	B	C	D	E	F	G	H	Обхват талии
M	89±1	20±1	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	70-82
L	100±1								80-93
XL	110±1								90-103
XXL	118±1								100-111

Орtez для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388282

Артикул 82394

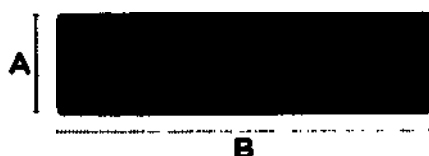

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	24±0,5	82±1	80-90
M		91±1	90-100
L		100±1	100-110
XL		107±1	110-120

Орtez для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52394


Артикул 82180



Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	90±1	19±0,5	70-85
M	98±1	20±0,5	85-93
L	112±1	23±0,5	93-107

Орtez для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52180

Артикул 388342

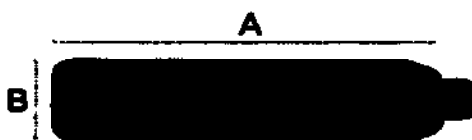

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	90±1	19±0,5	70-85
M	98±1	20±0,5	85-93
L	112±1	23±0,5	93-107

Орtez для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388342


Артикул 52403



Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	83±1	23±1	60-75
M	103±1		75-95
L	105±1		95-100
XL	112±1		100-105
XXL	124±1		105-120

Орtez для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52403

Артикул 52212

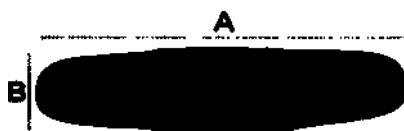

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	83±1	23±1	60-75
M	103±1		75-95
L	105±1		95-100
XL	112±1		100-105
XXL	124±1		105-120

Орtez для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52212

Артикул 52405



Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	89±1	23±1	60-75
M	103±1		75-95
L	105±1		95-100
XL	112±1		100-105
XXL	124±1		105-120

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52405


Артикул 52402



Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	89±1	23±1	60-75
M	103±1		75-95
L	105±1		95-100
XL	112±1		100-105
XXL	124±1		105-120

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52402


Артикул 52404

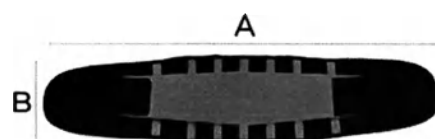

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	89±1	23±1	60-75
M	103±1		75-95
L	105±1		95-100
XL	112±1		100-105
XXL	124±1		105-120

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52404

Артикул 52406

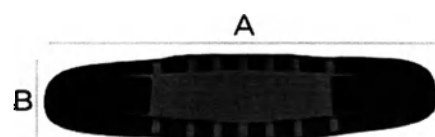

Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	91±1	23±1	60-75
M	103±1		75-95
L	105±1		95-100
XL	112±1		100-105
XXL	124±1		105-120

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52406


Артикул 388264



Размер	Длина, см		
	A	B	Обхват талии
S	89±1	20±1	60-75
M	106±1		75-95
L	119±1		95-115
XL	127±1		115-125

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388264

Артикул 388270

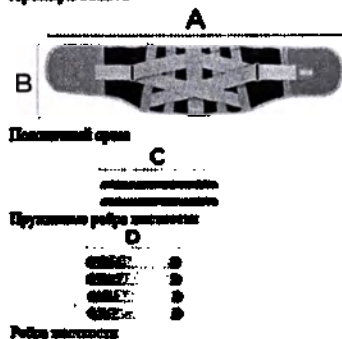

Размер	Длина, см										Объем талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
M	94±2	24±1	24±0,5	19±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	65-80
L	94±2										80-90
XL	104±2										90-100
XXL	114±2										100-110

Вставка с турельными

Вставка с поролом

Вставка-карман

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388270

Артикул 388297



Размер	Длина, см								Объем талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	
M	90±2	24±1	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	60-80
L	100±2								80-90
XL	110±2								90-100
XXL	120±2								100-110


Вставка с турельными

Вставка с поролом

Вставка-карман

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388297

Артикул 388300

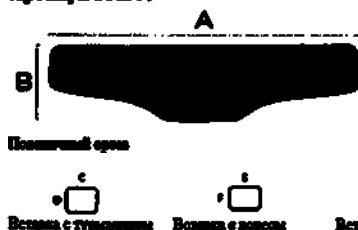

Размер	Длина, см								Объем талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	
M	90±2	24±1	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	60-80
L	100±2								80-90
XL	110±2								90-100
XXL	120±2								100-110


Вставка с турельными

Вставка с поролом

Вставка-карман

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388300

Артикул 388306

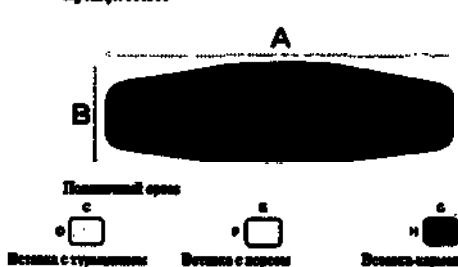

Размер	Длина, см								Объем талии
	A	B	C	D	E	F	G	H	
M	90±1	24±1	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	24±0,5	20±0,5	60-80
L	100±1								80-90
XL	110±1								90-100
XXL	120±1								100-110


Вставка с турельными

Вставка с поролом

Вставка-карман

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388306

Артикул 388318

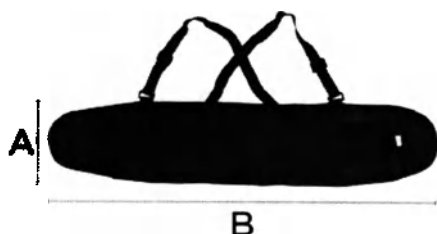

Размер	Длина, см		
	A	B	Объем ткани
S	20±1	100±1	75-90
M		105±1	90-95
L		110±1	95-100
XL		115±1	100-105
XXL		120±1	105-110

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388318



Размер	Длина, см		
	A	B	Объем ткани
Универсальный	99±1	21±0,5	60-100

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 52182

Артикул 388333



Размер	Длина, см		
	A	B	Объем ткани
S/M	127±1	11±0,5	90-117
L/XL	140±1		117-138

Ортез для поясничного отдела позвоночника «INNORTO», артикул 388333

8. Показания к применению

- ортез для грудного отдела позвоночника: выпрямление и разгрузка грудного отдела позвоночника, например, при искривлении грудного отдела позвоночника, при болях в грудном отделе позвоночника, устранение спазмов мышц спины.

- ортез для поясничного отдела позвоночника: боли в поясничной области позвоночника, люмбалгия, рецидивная люмбалгия, остеохондроз, спондилоартроз, люмбоишиалгия, спондилез без смещения позвонков, легкая и средняя люмбальная деформация (дегенеративное смещение позвонков), после операции межпозвоночной грыжи, легкий радикулярный синдроме.

9. Противопоказания к применению

Облитерирующий атеросклероз периферических артерий, нарушение тока лимфы, заболевания внутренних органов, при которых сдавливание тела может вызвать рецидив, кожные заболевания в этой области.

10. Возможные побочные действия

При правильно подобранном размере и при правильном использовании побочных явлений не выявлено. Если ношение ортеза показано и ночью, избегать нарушения кровообращения. При чувстве онемения ослабить ортез или при необходимости снять.

11. Меры предосторожности при применении

Беречь от влаги и солнечных лучей.

Не использовать стиральный порошок.

Не гладить.

Не отбеливать.

Изделие не должно подвергаться химической чистке.

Не рвать, не колоть.

Запрещено просушивать изделия вблизи открытого огня или на горячей батарее.

Запрещено соприкосновение изделий с красящими веществами, растворителями и маслами.

Не подвергать резким нагрузкам (прыжки, падения и т.п.) для сохранения целостности швов.

По санитарно-химическим и токсикологическим показателям изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 52770.

Изделия должны быть изготовлены из материалов, не оказывающие вредного влияния на организм человека, безопасных для здоровья пациента.

Изделия обладают биосовместимостью с кожным покровом потребителя, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями по ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ Р 52770.

Не следует обрезать нити и петли, появившиеся в результате ненадлежащего обращения с изделием. Не тяните и не срезайте какие-либо нити на изнаночной стороне изделия.

Применение ортезов следует осуществлять на срок от 1 до 4 часов.

Прежде чем впервые надеть ортез, необходимо проконсультироваться с врачом.

При чувстве онемения ослабить ортез или при необходимости снять.

При дискомфорте надевать поверх одежды.

Некоторые крема, мази и масла могут испортить изделие и оставить на нем пятна.

12. Указания по эксплуатации

Указания по эксплуатации ортезов для грудного отдела позвоночника:

Надеть ортез на плечи. Провести оба плечевых ремня-фиксатора вперед и застегнуть их под грудью. С помощью боковых застежек велькро он позволяет надежно зафиксировать конструкцию, не давая ей съезжать и перекручиваться, а также позволяя регулировать размер и посадку ортеза.


Указания по эксплуатации ортезов для поясничного отдела позвоночника:

обернуть ортез вокруг талии, застегнуть застежку спереди. Ортез должен располагаться по центру. Чтобы дополнительно снять нагрузку с поясницы, отрегулировать боковые ремни-фиксаторы, равномерно и одновременно туго затянув их. Важно, чтобы затягивание происходило одновременно с обеих сторон, в этом случае избегается ненужная ротация позвоночника.


Если изделие имеет пелоты-вставки, то эти вставки должны быть расположены широкой стороной вверх.

Все элементы затягивать таким образом, чтобы возникло комфортное чувство поддержки. Избегать при этом чувства затекания или онемения.

Инструкция по правильному подбору размера

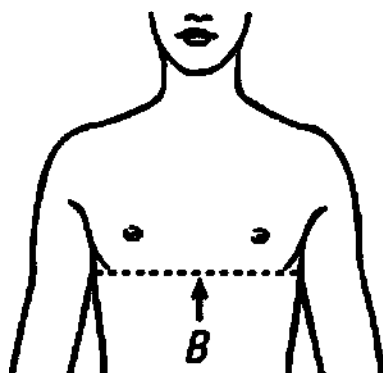

Для того, чтобы правильно подобрать размер ортеза для грудного отдела, нужно измерить обхват грудной клетки так, как это показано пунктиром на чертеже.

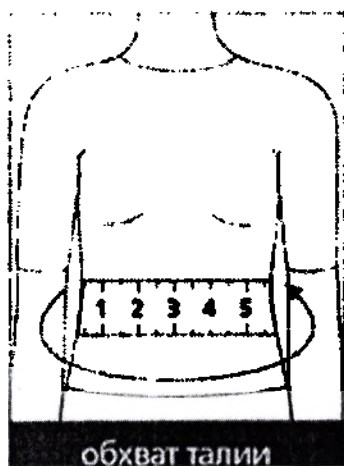

Для того, чтобы правильно подобрать размер ортеза для поясничного отдела, нужно измерить обхват талии

На каждую потребительскую (индивидуальную упаковку) наносят следующие сведения:

- наименование и (или) торговое наименование изделия;
- наименование и (или) торговое наименование варианта исполнения изделия;
- сведения о производителе, включая полное и сокращенное (при наличии) наименование, почтовый адрес производителя, страна происхождения медицинского изделия;
- место производства изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- размер изделия;
- номер партии изделия;
- дату изготовления
- срок годности
- условия утилизации;
- условия хранения
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- количество изделий в упаковке
- символ «Не стерильно»
- символ «Обратиться к эксплуатационной документации»
- символ «Беречь от солнечных лучей»

- символ «Беречь от влаги»
- символ «Ручная стирка»
- символ «Деликатная стирка в стиральной машине при температуре не более 30°C»
- символ «Отжимание без выкручивания»
- символ «Нельзя гладить»

Символы, указанные на маркировке

Символ	Обозначения
	Производитель
	Дата изготовления
	Норме партии
	Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Беречь от солнечных лучей
	Изделие не стерильно
	Ручная стирка
	Деликатная стирка в стиральной машине при температуре не более 30°C»
	Отжимание без выкручивания
	Нельзя гладить

13. Транспортирование и хранение

- Ортезы транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.
- Изделия транспортируются в сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности 50-70%, избегая сдавливания изделий.
- Запрещено транспортировать ортезы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами, обладающими сильным запахом (бытовая химия).
- Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Условия хранения – по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150, но при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности 50-70%.

14. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует следующие эксплуатационные характеристики:

- усадка после первой стирки не более 20% линейных размеров до стирки;
- значения остаточной деформации изделий до и после стирки не более 10%;
- изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки – не более 20% от их разрывного удлинения до стирки, а также соответствие заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Гарантийный срок годности – 5 лет с момента изготовления.

15. Правила использования и уход за изделием. Техническое обслуживание и ремонт

- Не применять при ношении изделий кремы или бальзамы. Это может повредить материал изделия.
- Ортезы не требуют сервисного, технического обслуживания и ремонта.
- Ортезы подлежат ручной, а также деликатной стирке в стиральной машине при температуре не выше 30°C и уходу как за обычным синтетическим нижним бельем. Регулярная стирка не повредит ортезам.
- Не используйте при стирке смягчающих средств, отбеливателей и пятновыводителей (таких как терпентин, бензин и т.п.).
- Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания и сушка в расправленном виде вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Сушите при комнатной температуре на сухом полотенце.
- Не гладить.
- Не рекомендуется сушить изделия на солнце или отопительной батарее.

16. Требования к дезинфекции, стерилизации и очистке

Требования к очистке и дезинфекции

Очистку изделий проводить путем протирания теплой водой с температурой плюс $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ раствором детского мыла по ГОСТ 28546 или раствором нейтральных моющих средств по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Очистку изделий из натуральной кожи осуществлять только отжатой салфеткой, смоченной в моющем растворе.

Требования к дезинфекции

Дезинфекции не подлежит.

Требования к стерилизации

Изделие поставляется нестерильным.

Стерилизации не подлежит.

17. Требования безопасности и охрана окружающей среды

Производственные технологические процессы изготовления изделий должны исключать загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материалами и

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения отходов материалов на территории производителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

Отходы, образующиеся при производстве, подлежат вторичной переработке. Отходы, не пригодные для вторичной переработки, подлежат размещению и утилизации, которую осуществляют на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

Изделие в поставляемом виде и в условиях эксплуатации экологически безопасно.

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

Материалы изделия являются нетоксичными, не аллергенными и не содержат вредных веществ, способных нанести вред окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (медицинском применении) и утилизации.

Изделие в процессе эксплуатации не производит негативных воздействий на окружающие среды и не является источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водоемов. При медицинском применении изделия необходимо руководствоваться соответствующими разделами эксплуатационной документации и не допускать утилизации изделия в неустановленном порядке.

Упаковку изделия утилизируют в места сбора бытового мусора.

Неиспользованные изделия в поврежденной упаковке и изделия с истекшим сроком годности подлежат утилизации, как отходы класса А (эпидемиологически неопасные отходы) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

19. Перечень нормативных документов

ГОСТ 12.0.230-2007	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Общие требования
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 58268-2018	Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация
ГОСТ Р 57892-2017	Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 58236-2020	Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности
ГОСТ ISO 10993-5-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами <i>in vitro</i>
ГОСТ ISO 10993-10-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibilизирующего действия
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ОСТ 17-10-030-2000	Ленты отделочные. Общие технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 16218.0-93	Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 11358-89	Толщиномеры и стенкоммеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 13837-79	Динамометры общего назначения. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 28840-90	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 21239-93	Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 21241-2023	Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 12

листах

