




Фотографические изображения общего вида

Набора реагентов «Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum* в реакции пассивной гемагглютинации»
"Сифилис-РПГА-тест"

Комплект 1/1 Серия 01 от 2020.01

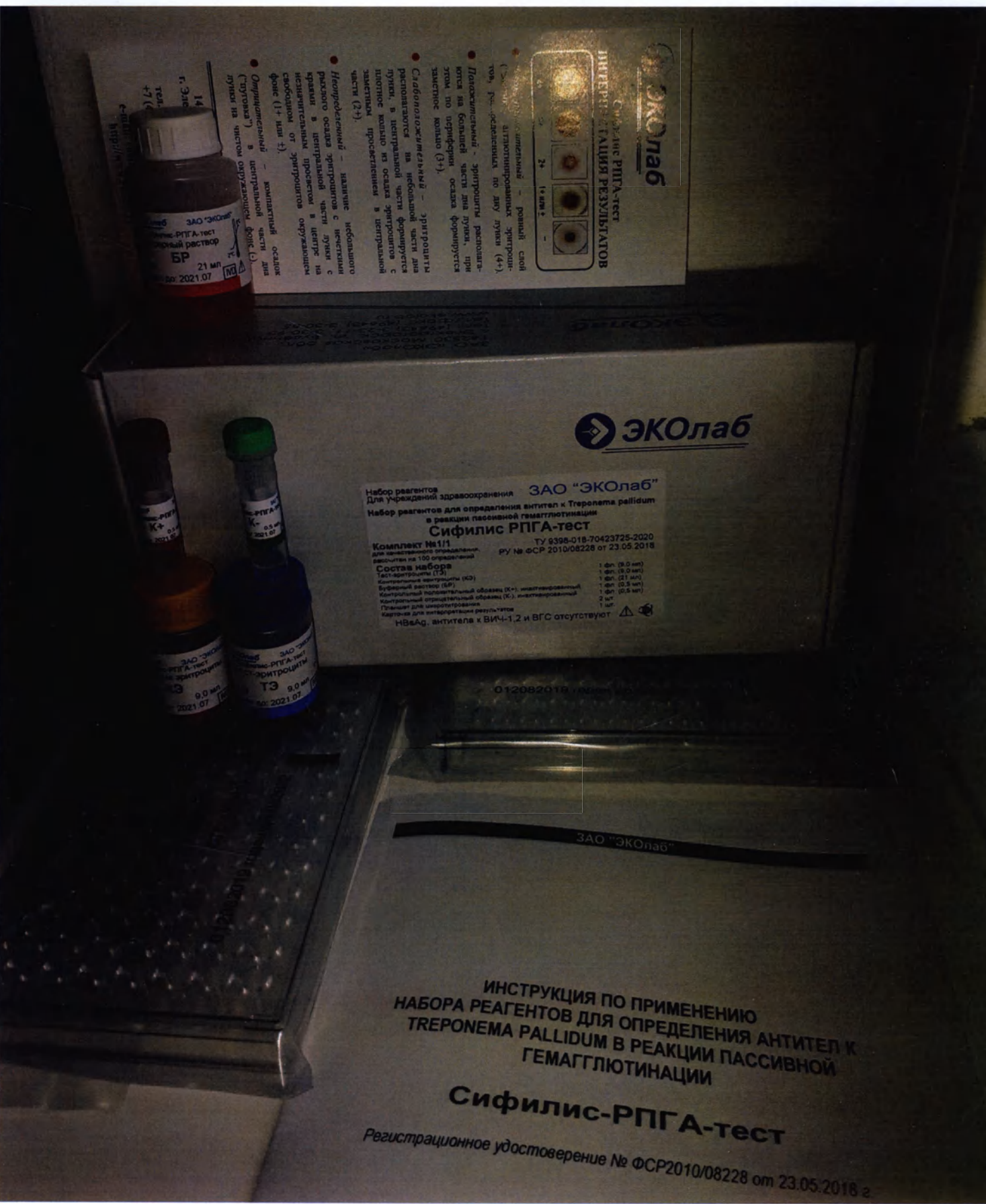


Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
ЗАО "ЭКОлаб"
Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum*
в реакции пассивной гемагглютинации
Сифилис РПГА-тест
Комплект №1/1
ТУ 8398-018-70423725-2020
РУ № ФСР 2010/08228 от 23.05.2018
Состав набора
Тест-картуш (1 шт.) 1 шт. (9,0 мл)
Контрольные эритроциты (КЭ) 1 шт. (9,0 мл)
Буферный раствор (БР) 1 шт. (21 мл)
Контрольный положительный образец (К+) интактный/инфицированный 1 шт. (0,5 мл)
Контрольный отрицательный образец (К-) интактный/инфицированный 1 шт. (0,5 мл)
Пластины для интерпретации результатов 2 шт.
Карточка для интерпретации результатов 1 шт.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К
TREPONEMA PALLIDUM В РЕАКЦИИ ПАССИВНОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

Сифилис-РПГА-тест

Регистрационное удостоверение № ФСР2010/08228 от 23.05.2018 г.



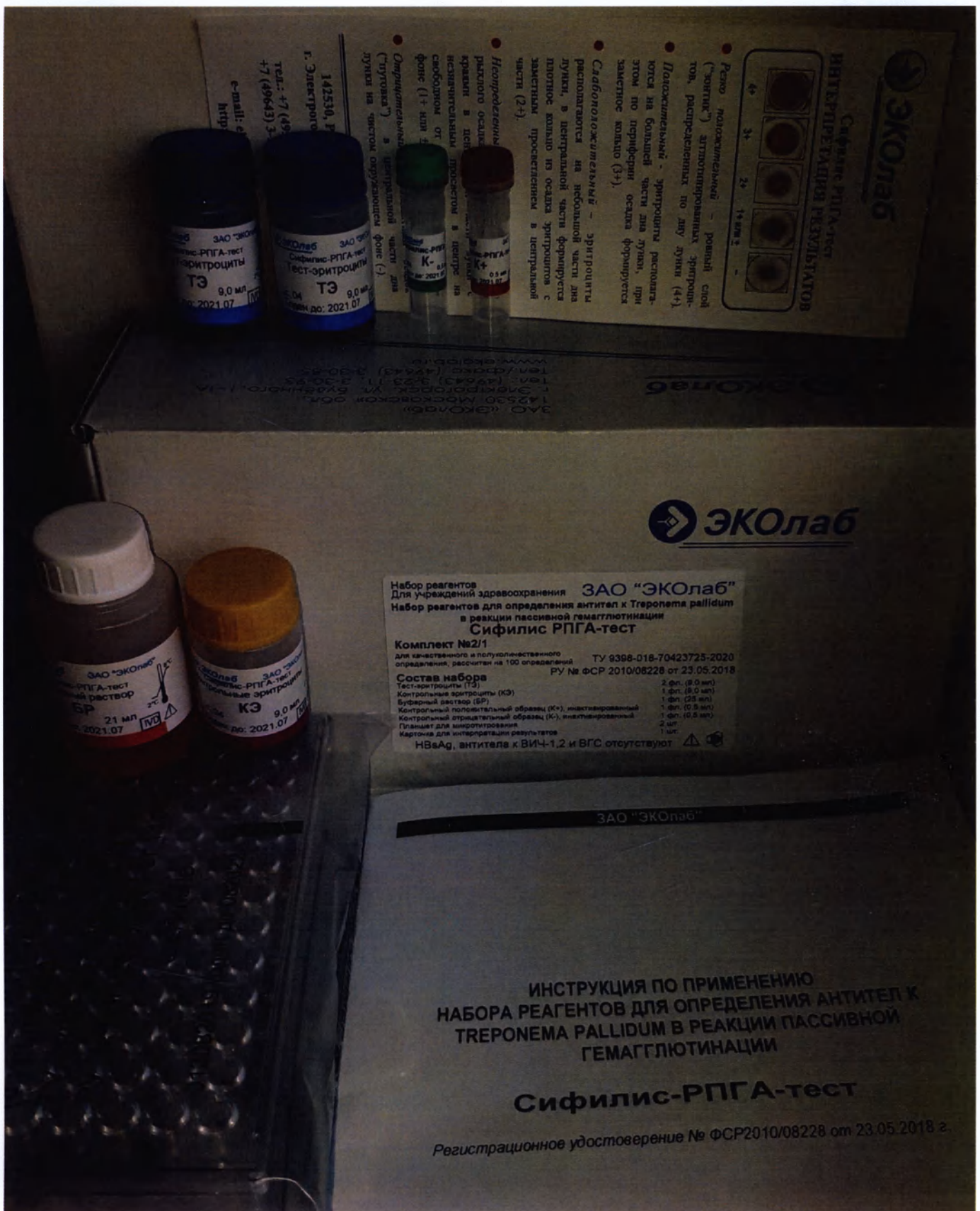

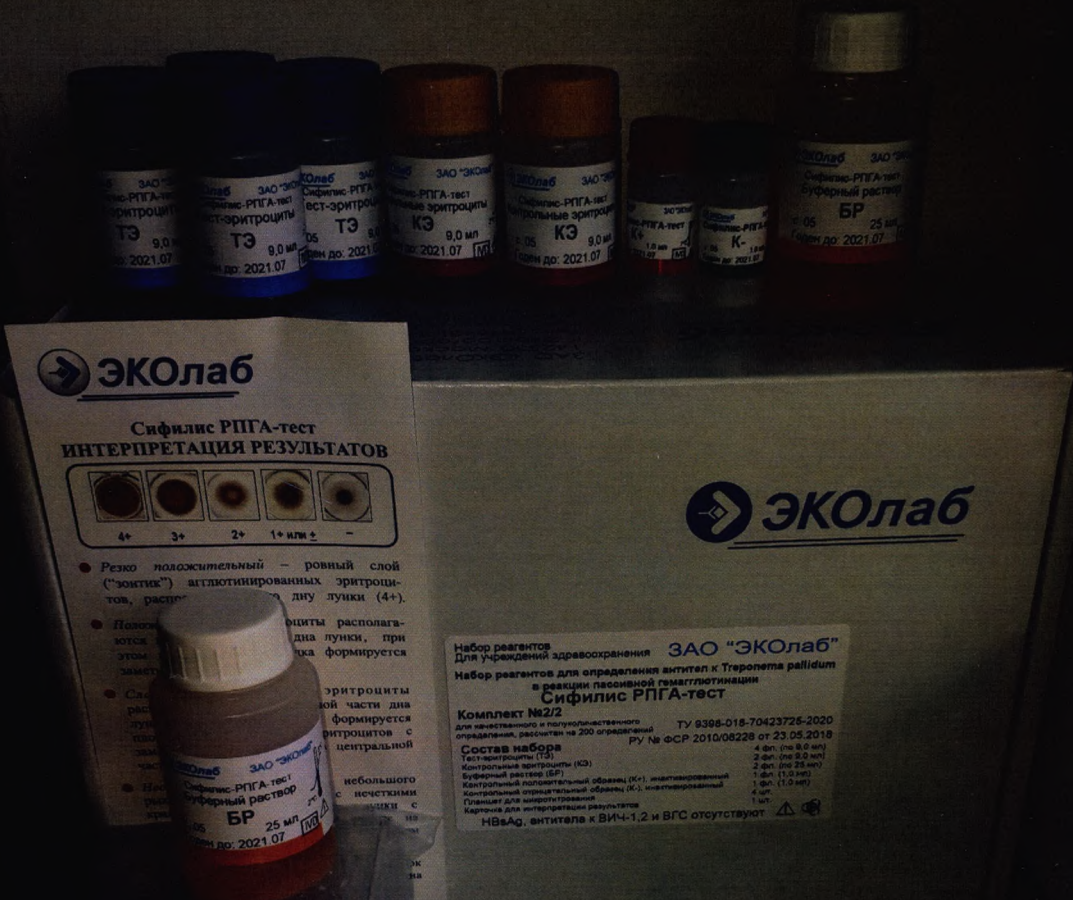

ЭКОлаб

**Сифилис РПГА-тест
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**



- Резко положительный – ровный слой ("зюкки") агглютинированных эритроцитов, расплывчатый по всей площади луночки (4+).
- Положительно – эритроциты располагаются в центре луночки, при этом формируется центральная часть (3+).
- Слабоположительно – эритроциты формируются в центре луночки, но не полностью (2+).
- Небольшой – эритроциты формируются в центре луночки, но не полностью (1+ или +).
- Негативный – эритроциты не агглютинируются, оседают на дно луночки (-).

ЭКОлаб

Набор реагентов для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum*
в реакции пассивной гемагглютинации
Сифилис РПГА-тест
Комплект №2/2
для качественного и полуколичественного
определения, рассчитан на 200 определений
ТУ 9398-018-70423725-2020
РУ № ФСР 2010/08228 от 23.05.2019


Состав набора
Тест-эритроциты (ТЭ) 4 фл. (по 9,0 мл)
Контрольные эритроциты (КЭ) 2 фл. (по 9,0 мл)
Буферный раствор (БР) 2 фл. (по 25 мл)
Контрольный положительный образец (К+) интактный 1 фл. (1,0 мл)
Контрольный отрицательный образец (К-) интактный 1 фл. (1,0 мл)
Гланцет для микротитрования 1 шт.
Карточка для интерпретации результатов 1 шт.

НВсAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ
ТРЕПОНЕМА PALLIDUM В РЕАКЦИИ ПАССИВНОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ**

Сифилис-РПГА-тест

Регистрационное удостоверение № ФСР2010/08228 от 23.05.2019

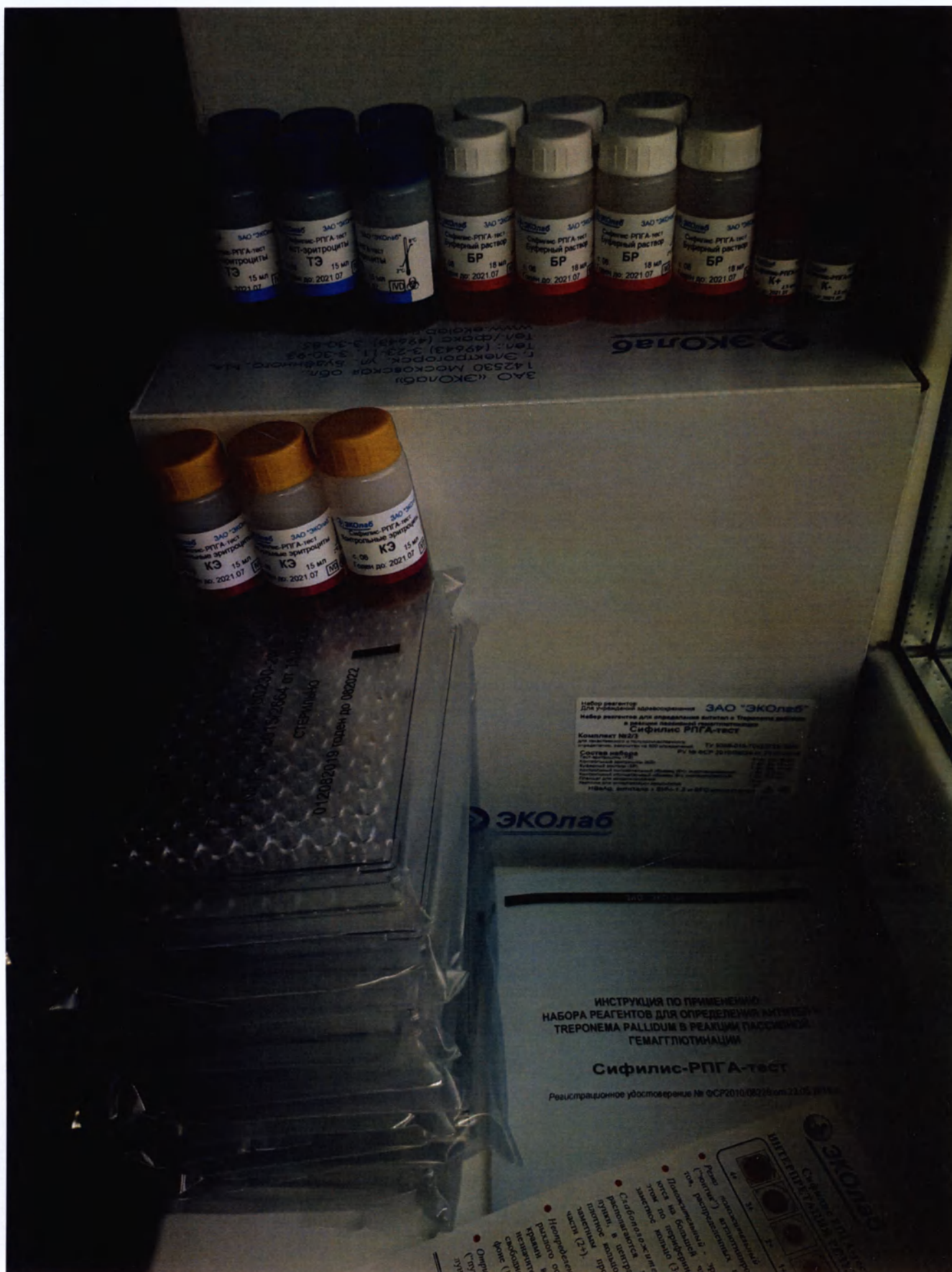

ЭКОлаб

Сифилис РПГА-тест

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



4+ 3+ 2+ 1+ 0

- **Положительный** - эритроциты равномерно оседают на большей части для лунок, при этом по периферии осадка формируется кольцо (3+).
- **Полуположительный** - эритроциты оседают на небольшой части для лунок, в центральной части формируется осадок, который на осадке эритроцитов с заметным просветлением в центральной части (2+).
- **Неопределенный** - наличие небольшого осадка эритроцитов с нечеткими краями в центральной части лунок с незначительным просветом в центре на свободном от эритроцитов окружающем фоне (1+ или ±).
- **Отрицательный** - компактный осадок ("пуховка") в центральной части для лунок на чистом фоне (0).

14
Г. Эле
ТЭЛ:
+7(4)

с-матр: <http://www.eko-lab.ru>

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
Сифилис-РПГА-тест
Буферный раствор
БР
21 мл
Серия 07 от 2021.07

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

Сифилис-РПГА-тест
Тест-эритроциты
ТЭ
9,0 мл
Серия 07 от 2021.07

Сифилис-РПГА-тест
Тест-эритроциты
ТЭ
9,0 мл
Серия 07 от 2021.07

Сифилис-РПГА-тест
Тест-эритроциты
ТЭ
9,0 мл
Серия 07 от 2021.07

ЭКОлаб

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения антител к *Treponema pallidum*
в реакции пассивной гемагглютинации

Сифилис РПГА-тест

Комплект №1/1
для количественного определения,
расчитан на 100 определений

ТУ 9398-018-70423725-2020
РУ № ФСР 2010/08228 от 23.05.2018

Состав набора

Тест-эритроциты (ТЭ)	1 фл. (9,0 мл)
Контрольные эритроциты (КО)	1 фл. (9,0 мл)
Буферный раствор (БР)	1 фл. (21 мл)
Контрольный положительный образец (О+), инaktivированный	1 фл. (0,5 мл)
Контрольный отрицательный образец (О-), инaktivированный	1 фл. (0,5 мл)
Планшет для микротитрования	2 шт.
Карточка для интерпретации результатов	1 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К
TREPONEMA PALLIDUM В РЕАКЦИИ ПАССИВНОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

Сифилис-РПГА-тест

Регистрационное удостоверение № ФСР2010/08228 от 23.05.2018 г.



Набед разгледите! За уредбавање здравственички ЗАО «ЭКОлаб»
 Набед разгледите! За општавудане витопане и Грешане разгледите
 а општавудане витопане и Грешане разгледите
 Сифилс РПГА-2
 Комплект №112
 РГ 2308-0110-10 23.07.98-2000
 РГ № СР 230806218 от 23.07.98-2000

СИСТЕМ НАБЕД
 (набед разгледите! За уредбавање здравственички ЗАО «ЭКОлаб»)
 Набед разгледите! За општавудане витопане и Грешане разгледите
 а општавудане витопане и Грешане разгледите
 Сифилс РПГА-2
 Комплект №112
 РГ 2308-0110-10 23.07.98-2000
 РГ № СР 230806218 от 23.07.98-2000

НБАВ, општавудане витопане и Грешане разгледите
 а општавудане витопане и Грешане разгледите
 Сифилс РПГА-2
 Комплект №112
 РГ 2308-0110-10 23.07.98-2000
 РГ № СР 230806218 от 23.07.98-2000

Сифилис-РПГА-тест

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08218 от 23.08.2010

ЭКОЛОБ

Сыворотка ПИВ-тест

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

[illegible]



Набор реагентов
для определения наличия антител к *Treponema pallidum*
в реакции пасивной гемагглютинации
Сифилис РПГА-тест

Комплект №21
для качественного и полуколичественного
определения, рассчитан на 100 определений
ТУ 9398-018-7043725-2020
РУ № ФСР 2010.08228 от 23.05.2018

Состав набора
Тест-эритроциты (ТЭ)
Буферный раствор (БР)
Контрольный положительный образец (КО), инкубированный
Контрольный отрицательный образец (КО), неинкубированный
Пластины для интерпретации результатов
Микропластины для интерпретации результатов
НВсAg, антигены к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К
TREPONEMA PALLIDUM В РЕАКЦИИ ПАСИВНОЙ
ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

Сифилис-РПГА-тест


Регистрационное удостоверение № ФСР2010/08228 от 23.05.2018 г.



- **Резко положительный** – ровный слой ("зонтик") агглютинированных эритроцитов, распределенных по дну лунки (4+).
- **Положительный** - эритроциты располагаются на большей части дна лунки, при этом по периферии осадка формируется заметное кольцо (3+).
- **Слабоположительный** – эритроциты располагаются на небольшой части дна лунки, в центральной части формируется плотное кольцо из осадка эритроцитов с заметным просветлением в центральной части (2+).
- **Неопределенный** – наличие небольшого рыхлого осадка эритроцитов с нечеткими краями в центральной части лунки, с незначительным просветом в центре, свободном от эритроцитов (1+ или ±).

компактный осадок в центральной части на чистом окружающем фоне

30. РФ, Московская обл.,
г. Истринск, ул. Буденного, д.
7 (495) 287-44-48, 287-44-4
43) 3-23-11, 3-30-85, 3-30-9
Ил: ekolab

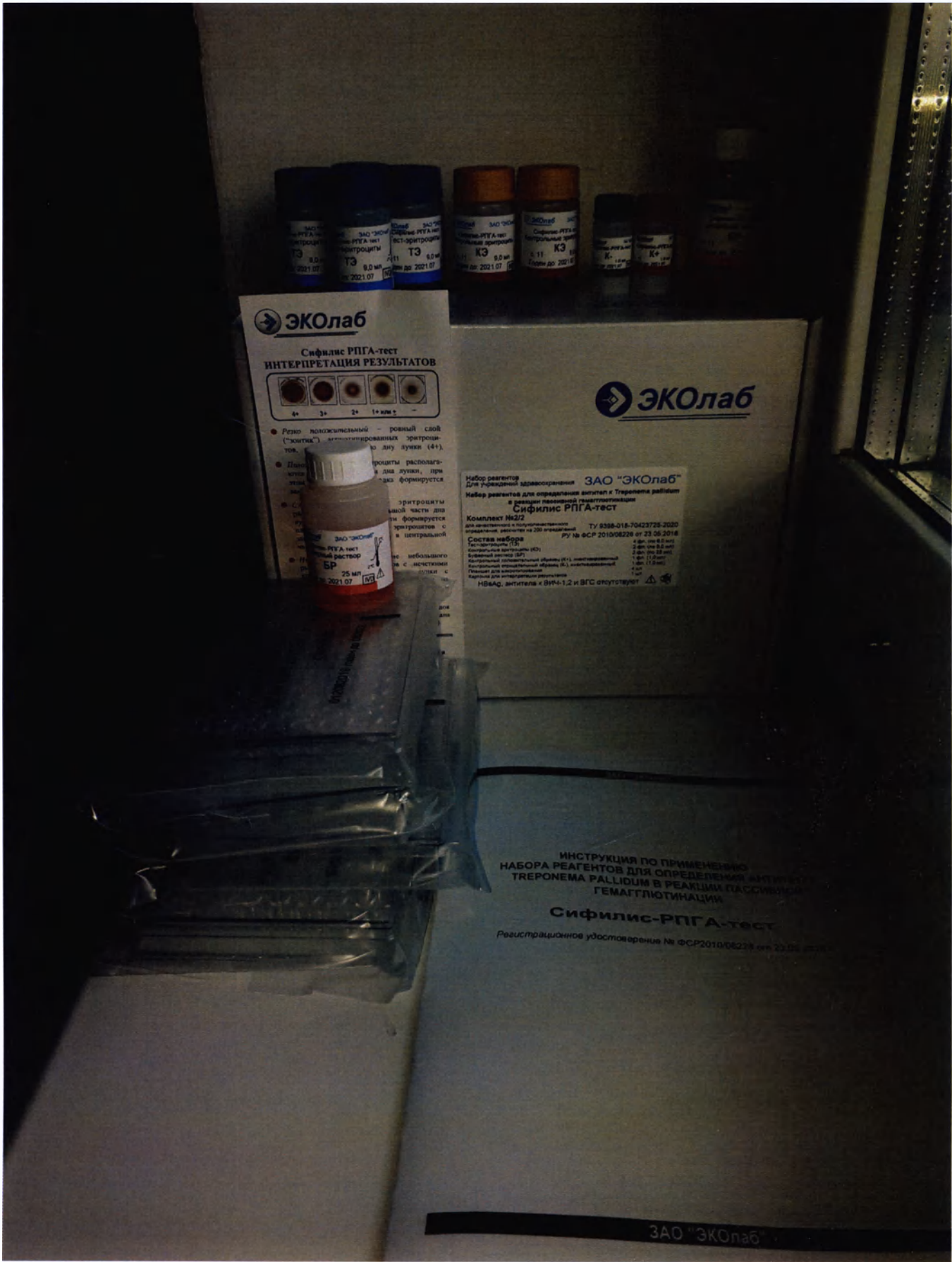



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов



и скреплено печатью
 12 (дванадцать) листів
 Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОЛаб"
 Гашенко Т.Ю.
 2021 г.

Зам. Ген. Дир.