

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

Генеральный директор

ООО «Гельтек-Медика»

от _____ 20 ____ г. № _____

Д.О. Шанин

2014 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Геля для ультразвуковых исследований стерильного «Медигель-с»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гель стерильный «Медигель-с» предназначен для использования в качестве контактной среды в тех случаях, когда необходима стерильная форма геля (чреспищеводная эхокардиография; исследования в ходе хирургических вмешательств, в том числе инвазивные процедуры; обследование больных с поврежденной кожей и слизистыми оболочками), для проведения ультразвуковых исследований, в условиях клиник, больниц, диагностических центров.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гель стерильный «Медигель-с» обладает оптимальной вязкостью, что создает эффективный контакт датчика УЗ-прибора со слизистыми или кожей пациента в случаях, когда необходима стерильная форма геля (в том числе в условиях агрессивных биологических сред) и обеспечивает прекрасную передачу ультразвука. Гель не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистые пациента, не портит датчики, водорастворимый. Гель упакован в двойную упаковку, позволяющую осуществлять манипуляции в стерильных условиях.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания не выявлены.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть стерильную упаковку. Гель нанести тонким слоем непосредственно на датчик или обследуемый участок тела пациента. По окончании ультразвуковых исследований гель легко удаляется с кожи пациента и датчика.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при температуре от +5 °С до +25 °С.

6. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности геля – 2 года с даты изготовления.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ

Упаковка с гелем относится к эпидемиологически безопасным отходам Класса А и может быть уничтожена (захоронена) как твердые бытовые отходы.

Главный специалист

Руководитель СКиТ

Н.А. Венгерова

Ю.С. Талыкова