

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГК ПАЛЬМА»

 Б.Ю. Бронштейн

«29» октября 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Пленок липких операционных «Пальма» (нестерильных)

1. Наименование

Пленки липкие операционные «Пальма»

2. Область применения

Нестерильные пленки предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией. После стерилизации стерильные пленки предназначены для закрытия операционного поля до проведения хирургических манипуляций с целью изоляции и защиты от вторичного инфицирования раны, разреза или прокола и кожи вокруг них.

3. Показания к применению

- комплектование хирургических наборов и комплектов.

4. Противопоказания для применения

- не использовать комплекты с липкой операционной пленкой в случае обработки кожи пациента водным или другим не спиртовым раствором антисептиков.

5. Срок годности и указания на запрет использования по истечению срока годности

- срок годности нестерильных пленок - 5 лет

6. Условия хранения

- условия хранения пленок должны соответствовать группе хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

7. Сведения о производителе

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 108809, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1.

Тел.: 8(495)921-37-19

Email: palma@palma-med.ru

ТУ ТУ 32.50.13-012-83228278-2019

РУ XXX/XXX от XX.XX.XXXX.

Предыдущая версия документации утверждена 09.04.2013 г.

8. Технические характеристики

Пленка представляет собой изделие, состоящее из пленки-основы с клеевым слоем и бумажным защитным покрытием клеевого слоя.

Пленки выпускаются следующих размеров: (200x500) мм, (300x500) мм, (400x500) мм, (500x500) мм с размером клеевого слоя (200x340) мм, (300x340) мм, (400x340)мм, (500x340)мм и (500x400) мм.

В пленках не допускаются посторонние включения, запрессованные складки, участки, непокрытые клеем.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 25 Н/м.

9. Требования к применению

Не использовать пленку в случае обработки кожи водным или другим не спиртовым раствором антисептиков. В случае их использования обязательно протереть кожу спиртом и дождаться полного высыхания.

Не клеить на влажную кожу !

10. Порядок осуществления утилизации и уничтожения пленки

- утилизация осуществляется вместе с бытовыми отходами.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2

(два) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«29» октября 2024 г.

