

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ГК ПАЛЬМА»

Б.Ю. Бронштейн

«21» октября 2024 г.



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на медицинское изделие

«Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-УРО

по

ТУ 32.50.13-012-83228278-2019»

2024 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-УРО по ТУ 32.50.13-012-83228278-2019, в исполнении:

I. БИНАЦЕЛ®-УРО с краном прозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО с краном прозрачная (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ® (при необходимости поставляется отдельно).

II. БИНАЦЕЛ®-УРО+ с краном непрозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО+ с краном непрозрачная (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ® (при необходимости поставляется отдельно).

III. БИНАЦЕЛ®-УРО с клапаном прозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО с клапаном (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ® (при необходимости поставляется отдельно).

IV. БИНАЦЕЛ®-УРО+ с клапаном непрозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО+ с клапаном непрозрачная (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ® (при необходимости поставляется отдельно).

V. БИНАЦЕЛ®ОПТИМА УРО с краном прозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО с краном прозрачная (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ®ОПТИМА (при необходимости поставляется отдельно).

VI. БИНАЦЕЛ®ОПТИМА УРО+ с краном непрозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО+ с краном непрозрачная (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ®ОПТИМА (при необходимости поставляется отдельно).

VII. БИНАЦЕЛ®ОПТИМА УРО с клапаном прозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО с клапаном прозрачная (при необходимости поставляется отдельно);
2. Пластина БИНАЦЕЛ®ОПТИМА (при необходимости поставляется отдельно).

VIII. БИНАЦЕЛ®ОПТИМА УРО+ с клапаном непрозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО+ с клапаном непрозрачная (при необходимости поставляется отдельно);

2. Пластина БИНАЦЕЛ®ОПТИМА (при необходимости поставляется отдельно).

IX. Исполнение БИНАЦЕЛ®ПРИМА УРО с краном прозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО с краном прозрачная (при необходимости поставляется отдельно);

2. Пластина БИНАЦЕЛ®ПРИМА (при необходимости поставляется отдельно).

X. БИНАЦЕЛ®ПРИМА УРО+ с краном непрозрачная:

1. Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-УРО+ с краном непрозрачная (при необходимости поставляется отдельно);

2. Пластина БИНАЦЕЛ®ПРИМА (при необходимости поставляется отдельно).

XI. БИНАЦЕЛ®ПРИМА УРО с клапаном прозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО с клапаном прозрачная (при необходимости поставляется отдельно);

2. Пластина БИНАЦЕЛ®ПРИМА (при необходимости поставляется отдельно).

XII. БИНАЦЕЛ®ПРИМА УРО+ с клапаном непрозрачная:

1. Емкость уростомная БИНАЦЕЛ®-УРО+ с клапаном непрозрачная (при необходимости поставляется отдельно);

2. Пластина БИНАЦЕЛ®ПРИМА (при необходимости поставляется отдельно).

Принадлежности:

1. Полукольцо СОФАЛЬ, адгезивное;
2. Полукольцо СОФАЛЬ А, адгезивное;
3. Пояс БИНАЦЕЛ®.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Система двухкомпонентная предназначена для сбора выделений у пациентов с уростомами диаметром от 20 до 60 мм.

Емкости БИНАЦЕЛ® предназначены для сбора выделений у пациентов с уростомами.

Пластины предназначены для крепления Емкостей БИНАЦЕЛ® к коже пациентов со стомой диаметром от 20 до 60 мм, а также для защиты кожи вокруг стомы.

Полукольца СОФАЛЬ предназначены для дополнительной фиксации и продления срока использования кало- и уроприемников.

Пояс БИНАЦЕЛ® предназначен для дополнительной фиксации Систем двухкомпонентных для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Система двухкомпонентная и принадлежности применяются в нестерильных условиях как высококвалифицированным и младшим медицинским персоналом в лечебно-профилактических медицинских учреждениях, так и пациентами в домашних условиях.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

Индивидуальная непереносимость.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

Система двухкомпонентная может быть использован в сочетании с медицинским изделием «Покрытие защитное пастообразное для ухода за кожей вокруг стомы АБУЦЕЛ®» РУ № РЗН 2014/1388 (паста АБУЦЕЛ®) для более длительного использования, а также для защиты кожи вокруг стомы.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

6.1. Поверхности Емкостей, Пластин и Полуколец должны быть без посторонних включений, запрессованных складок, загрязнений и повреждений.

В Емкостях не допускается наличие слипшихся участков пленки.

В адгезивном материале Пластин и Полуколец должны отсутствовать разрывы, посторонние включения, каверны, искажения формы.

Поверхность фланца емкости, фланца пластины и фиксатора должна быть без повреждений, недоливов, раковин, заусенцев, посторонних включений, коробления.

Поверхность застежек и регулятора длины Пояса должна быть без загрязнений, недоливов, заусенцев и надломов.

Поверхность эластичной ленты Пояса должна быть без загрязнений, посторонних включений, повреждений и складок.

6.2. Система двухкомпонентная или Емкость (при отдельной поставке) должны быть прочными на разрыв (статический): материал и сварные швы Емкости должны сохранять целостность и герметичность под воздействием приложенной к изделию, заполненному раствором на 75% объема, сжимающей нагрузки 200 ± 5 Н.

6.3. Система двухкомпонентная, Емкость или Пластина (при отдельной поставке) должны быть герметичны после приложения нагрузки: соединения элементов в Системе двухкомпонентной, Пластины и Емкости должны сохранять целостность и быть герметичными при приложении к изделию нагрузки $20 \pm 0,5$ Н в двух противоположных направлениях с последующей выдержкой заполненного раствором на 75% объема изделия в течение 30+1 мин.

6.4. Система двухкомпонентная должна быть герметичной при длительной выдержке заполненного раствором (75% объема) изделия под собственным весом в горизонтальном положении в течение 17 ± 1 час. и вертикальном положении в течении 4 ± 1 час.

6.5. Водопоглощение адгезивного материала Пластины и Полуколец должно быть не менее 180%.

6.6. Величина адгезионной характеристики адгезивного гидроактивного материала Пластины и Полуколец по сопротивлению отслаиванию от металлической пластины должна быть не менее 50 Н/м.

7. ВИД КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА, КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

Система двухкомпонентная и принадлежности относятся к нестерильным изделиям одноразового непрерывного применения при длительном контакте (от 24 часов до 30 суток) с неповрежденной кожей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

8.1. В комплект поставки Систем двухкомпонентных должны входить:

• **Емкость:**

- Емкость уростомная одного исполнения – не более 10 шт.;
- Инструкция – 1 шт.;
- Потребительская упаковка с нанесенной маркировкой – 1 шт.

• **Пластина:**

- Пластина одного исполнения – не более 10 шт.;
- Инструкция – 1 шт.;
- Потребительская упаковка с нанесенной маркировкой – 1 шт.

• **Пояс:**

- Пояс – 1 шт. на 5 шт. Емкостей, но не менее 1 шт.;
- Инструкция – 1 шт.;
- Потребительская упаковка с нанесенной маркировкой – 1 шт.

• **Групповая упаковка с нанесенной маркировкой** – 1 шт.

8.2. При поставке принадлежностей:

8.2.1. В комплект поставки Полуколец СОФАЛЬ должны входить:

- Полукольцо одного исполнения – 2, 3, 4, 5 или кратно 2 шт.;
- Инструкция – 1 шт.;
- Потребительская упаковка с нанесенной маркировкой – 1 шт.

8.2.2. В комплект поставки Поясов должны входить:

- Пояс – не более 10 шт.;
- Этикетка с инструкцией – 1 шт.;
- Потребительская упаковка – 1 шт.

9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

9.1. Порядок применения «Системы двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-УРО»

Как правильно вырезать отверстие в пластине.

Отверстие в пластине должно соответствовать форме и размеру стомы.

Липкий слой пластины БИНАЦЕЛ® покрыт защитным покрытием с нанесенными на него концентрическими окружностями.

Отверстие для стомы можно вырезать по концентрическим окружностям или по индивидуальному шаблону, который можно изготовить самостоятельно из плотного картона. Шаблон должен соответствовать размеру стомы. Рекомендуем пользоваться ножницами с тупыми изогнутыми концами.

Как подготовить стому.

Для того, чтобы пластина БИНАЦЕЛ® хорошо держалась на теле, кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, без кремов, мазей и пр. Вымойте кожу вокруг стомы теплой водой с мылом и высушите мягким полотенцем или феном.

Не наклеивайте пластину на влажную кожу! Тщательно просушите кожу вокруг стомы для лучшего приклеивания пластины.

При неосторожном прикосновении к стоме может возникнуть кровотечение. Не беспокойтесь, это нормально, т.к. поверхность стомы очень нежная. Осторожно прижмите к стоме чистую салфетку, и кровотечение быстро прекратится.

Как наклеить пластину.

Перед наклеиванием в течение нескольких минут прогрейте Пластину (не снимая защитного покрытия) между ладонями, подмышкой или на каком-либо закрытом источнике тепла (батареи отопления, обогревателя и т.п., температура которых не превышает 30°). Затем снимите защитное покрытие А, не затрагивая при этом защитное покрытие Б.

ВНИМАНИЕ! При наклеивании пластины на тело необходимо убедиться, что рычажок ориентирован строго вверх. *(информация указывается для пластин с фиксатором).*

Начиная с нижнего края отверстия для стомы, наклейте пластину на тело. После этого удалите защитное покрытие Б: сначала одну половинку, потом другую. Затем приложите липкий слой к телу.

Для лучшего приклеивания пластины плотно прижмите ее к телу и разгладьте липкий слой от стомы к краям.

Как соединить пластину с емкостью.

Убедитесь, что рычажок находится в правильном открытом положении. *(информация указывается для пластин с фиксатором).*

ВНИМАНИЕ! Рычажок хрупкий, не следует применять к нему больших усилий. *(информация указывается для пластин с фиксатором).*

Надевайте емкость на пластину, начиная снизу. Двигаясь вверх, аккуратно, надавливающими движениями, скрепите фланцевые замки емкости и пластины, таким образом, чтобы фланцевый замок пластины оказался внутри фланцевого замка емкости.

Переведите рычажок в закрытое состояние, аккуратно нажав на него сверху вниз до щелчка. *(информация указывается для пластин с фиксатором).*

Как отсоединить емкость от пластины

Переведите рычажок в открытое состояние, аккуратно потянув вверх. *(информация указывается для пластин с фиксатором).*

Придерживая пластину одной рукой, другой рукой возьмитесь за язычок фланцевого замка емкости и медленно потяните от себя.

Частота смены емкости определяется индивидуально.

Как опорожнить емкость БИНАЦЕЛ®-УРО со сливным краном.

Опорожнять емкость следует в туалете, не снимая со стомы.

Не допускайте заполнения емкости более, чем наполовину, это может привести к нарушению герметичности.

Для опорожнения уростомной емкости сдвиньте в сторону пробку сливного крана. После опорожнения верните пробку в исходное положение.

В ночное время рекомендуем использовать дополнительно мочеприемник. Присоединить его можно через силиконовый переходник, не снимая емкость со стомы. После присоединения мочеприемника к емкости откройте сливной кран.

Как опорожнить емкость БИНАЦЕЛ®-УРО со сливным клапаном.

Опорожнять емкость следует в туалете, не снимая со стомы.

Не допускайте заполнения емкости более, чем наполовину, это может привести к нарушению герметичности.

Для опорожнения уростомной емкости поднимите нижнюю часть емкости отверстием сливного клапана вверх, сожмите сливной клапан и извлеките пробку. Разожмите сливной клапан и опорожните емкость. После опорожнения плотно закройте сливной клапан пробкой.

Как сменить пластину.

Меняйте пластины по мере необходимости: при возникновении запаха, при подтекании в месте крепления, при ощущении каких-либо неудобств или в других случаях. Снимайте пластину медленно, осторожно отслаивая липкий слой, придерживая при этом кожу рукой. Следует избегать частой, неоправданной необходимостью смены пластин. При этом возможно раздражение кожи! Частота смены емкости определяется пациентом индивидуально.

Важно!

Не храните пластины БИНАЦЕЛ® в холодильнике!

Не выбрасывайте пластины и емкости БИНАЦЕЛ® в канализацию!

Важно!

Допускается наклеивание пластины БИНАЦЕЛ® на оставшиеся на коже фрагменты липкого слоя! Для более длительного использования пластин БИНАЦЕЛ® рекомендуем пользоваться пастой АБУЦЕЛ® или полукольцом СОФАЛЬ.

9.2. Порядок применения принадлежностей.

9.2.1. Порядок применения Полукольца СОФАЛЬ.

Как наклеить.

1. Приклейте однокомпонентный кало-, урприемник или Пластины БИНАЦЕЛ®.

2. Удалите защитное покрытие с полукольца СОФАЛЬ.

3. Наклейте полукольцо СОФАЛЬ внахлест на кольцо однокомпонентного кало- или урприемника или пластину БИНАЦЕЛ®.

4. При необходимости наклейте второе и третье полукольцо таким же образом.

Внимание!

Особые указания:

Наклеивание нового полукольца допускается на оставшиеся на коже фрагменты липкого слоя.

Как снять.

Снимайте полукольцо вместе с кало-, урприемниками или пластинами БИНАЦЕЛ®, осторожно отслаивая липкий слой от кожи, придерживая при этом кожу рукой.

Внимание!

Не выбрасывайте, использованное полукольцо в канализацию.

Не храните полукольца СОФАЛЬ в холодильнике.

10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

10.1. Системы двухкомпонентные и принадлежности транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

10.2. Условия транспортирования и хранения на складах поставщика Систем двухкомпонентных и Пластины – по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, но в интервале температур от минус 20°C до плюс 30°C.

10.3. Условия транспортирования и хранения на складах поставщика Емкостей и Поясов – по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, в интервале температур от минус 50°C до плюс 50°C.

10.4. Условия эксплуатации и хранения у потребителя Системы двухкомпонентные и принадлежностей в упаковке предприятия - изготовителя по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150, в интервале температур от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Систем двухкомпонентных и принадлежностей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящими техническими условиями.

12. СРОК ГОДНОСТИ.

12.1. Гарантийный срок годности Систем двухкомпонентных БИНАЦЕЛ®, Пластин БИНАЦЕЛ® и Полуколец СОФАЛЬ - 3 года с даты изготовления.

12.2. Гарантийный срок годности Емкостей, Поясов БИНАЦЕЛ® – 5 лет с даты изготовления.

13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ.

Использованные Системы двухкомпонентные и принадлежности относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №163).

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 108809, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1.

Тел.: 8(495)921-37-19

Email: palma@palma-med.ru

ТУ ТУ 32.50.13-012-83228278-2019
РУ XXX/XXX от XX.XX.XXXX.

Предыдущая версия документации утверждена 10.10.2019 г.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 12
(двенадцать) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.
«21» октября 2024 г.

МП

