

02 Ekim 2024

CANSIN SAĞLIK GEREÇLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstasyon Mah. 1495. Sok. No:17 Gebze/Kocaeli
Tel: 0262 655 54 12 - 655 36 00 Faks: 0262 656 64 88
Tic. Sic. No: 802143 Mersis No: 0262002152700023

02/10/2024

Версия 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пластырь медицинский САРБАНТ

Пластырь медицинский САРБАНТ (далее по тексту «пластырь» или «изделия»), в исполнениях:

- Пластырь медицинский САРБАНТ классический (S210, S211), телесного цвета, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19 x 72 мм;
- Пластырь медицинский САРБАНТ цветной (S212), цветные, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19 x 72 мм;
- Пластырь медицинский САРБАНТ ДИЗАЙН (S213), цветные с картинками, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19 x 72 мм;
- Пластырь медицинский САРБАНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (S214), телесного цвета, основа полимерная микроперфорированная, размером: 16 x 57 мм, 25 x 72 мм, 19 x 72 мм и основа полимерная, размером: Ø 22.5 мм;
- Пластырь медицинский САРБАНТ ПРОЗРАЧНЫЙ (S215), прозрачные, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19 x 72 мм;
- Пластырь медицинский САРБАНТ КРУГЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ (S216), прозрачные, основа полимерная микроперфорированная, размером: Ø 22.5 мм;
- Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S217), белого цвета, основа нетканая, размером: 6 x 25 см;
- Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S218), белого цвета, основа нетканая, размером: 6 x 10 см;
- Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S219), белого цвета, основа нетканая, размером: 6 x 25 см;

KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN
Vekili
Başkatip Erdal KARATAŞ

**- Пластырь медицинский САРБАНТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ (S221),
прозрачные, основа полиуретановая, размером: 19 x 72 мм.**

Назначение

Пластырь предназначен для индивидуального использования, для закрытия мелких травм кожи (ссадин, царапин, порезов, потертостей и др.) в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Пластырь может применяться в профилактических целях для предупреждения повреждений кожных покровов.

Пластырь применять при комнатной температуре с соблюдением правил асептики.

Пластырь нестерильный, является изделием одноразового использования.

Область применения для широкого применения.

Условия применения

Пластырь может применяться в клинических, поликлинических и в домашних условиях.

Основные технические характеристики

Пластырь медицинский САРБАНТ классический (S210, S211)

- телесного цвета, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19x72 мм

Основа: материал — полиэтилен; толщина 25-35 мкм*, перфорация имеется, цвет телесный, линейный размер 19x72 мм*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 12 x 7-23 мм*, цвет белый, иропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ цветной (S212)

- цветные, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19x72 мм

Основа: материал — полиэтилен; толщина 18-25 мкм*, перфорация имеется, цвет цветной, линейный размер 19х72 мм*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 12 х 7-23 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ ДИЗАЙН (S213)

- цветные с картинками, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19х72 мм

Основа: материал — полиэтилен; толщина 18-25 мкм*, перфорация имеется, цвет цветные с картинками, линейный размер 19х72 мм*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 12 х 7-23 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (S214)

- телесного цвета, основа полимерная микроперфорированная, размером: 16х57 мм, 25х72 мм, 19х72 мм и основа полимерная, размером Ø22.5 мм

Основа: материал — полиэтилен; толщина 18-25 мкм*, перфорация имеется 16х57 мм, 25х72 мм, 19х72 мм* и отсутствует Ø22.5 мм*, цвет телесный, линейный размер 16х57 мм*, 25х72 мм*, 19х72 мм* и Ø22.5 мм*

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 7-12 x 7-23 мм*, цвет белый - 16x57 мм, 25x72 мм, 19x72 мм, желтый Ø22.5 мм, пропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ ПРОЗРАЧНЫЙ (S215)

- прозрачные, основа полимерная микроперфорированная, размером: 19x72 мм

Основа: материал — полиэтилен; толщина 35-45 мкм*, перфорация имеется, цвет прозрачные, линейный размер 19x72 мм*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 7-12 x 7-23 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ КРУГЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ (S216)

- прозрачные, основа полимерная микроперфорированная, размером: Ø22.5 мм

Основа: материал — полиэтилен; толщина 35-45 мкм*, перфорация имеется, цвет прозрачные, линейный размер Ø22.5 мм*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 8x10 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S217)

- белого цвета, основа нетканая, размером: 6x25 мм

Основа: нетканый (вискоза(75%) с добавлением полиэфирных волокон(25%)); толщина 60-75 мкм*, перфорация имеется, цвет белый, линейный размер 6x25 см*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 70-100 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 1,8 x 10-25 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 90-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S218)

- белого цвета, основа нетканая, размером: 6x10 мм

Основа: нетканый (вискоза(75%) с добавлением полиэфирных волокон(25%)); толщина 60-75 мкм*, перфорация имеется, цвет белый, линейный размер 6x10 см*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 70-100 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен

(полиэстер) (25%), линейный размер 1,8 x 10-25 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 90-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S219)

- белого цвета, основа нетканая, размером: 6x25 мм

Основа: нетканый (вискоза(75%) с добавлением полиэфирных волокон(25%)); толщина 60-75 мкм*, перфорация имеется, цвет белый, линейный размер 6x25 см*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 70-100 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 1,8 x 10-25 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 90-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Пластырь медицинский САРБАНТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ (S221)

- прозрачные, основа полиуретановая, размером: 19x72 мм

Основа: материал — полиуретан; толщина 12-22 мкм*, перфорация отсутствует, цвет прозрачные, линейный размер 19x72 мм*.

Липкий слой (адгезив): материал - гипоаллергенный полиакрилатный клей (состав: акриловая смола (25%), синтетический каучук (25%), белое масло (5%), этилацетат (45%)).

Основа с адгезивом (пластырная основа): плотность 60-115 г/м², сопротивление отслаиванию липкого слоя не менее 25, не более 200 Н/м, водостойкость да.

Абсорбирующая подушечка: материал - натуральные вискозные волокна с атравматичным сетчатым полиэтиленовым покрытием (состав: вискоза (75%), полиэтилен (полиэстер) (25%), линейный размер 7-12 x 7-23 мм*, цвет белый, пропитка нег, плотность нормативная 100-170 г/м², сорбционная емкость абсорбирующей подушечки не менее 1 капель/см², время смачивания абсорбирующей подушечки не более 5 сек., степень адгезии подушечки к модели раневой поверхности не более 30%.

Защитный слой: материал - силиконизированная бумага.

Допустимые отклонения от линейных размеров основы и абсорбирующей подушечки ± 10 %.

Показания к применению

Мелкие травмы кожи (ссадины, царапины, порезы, потертости и др.). Профилактика повреждений кожных покровов.

Противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Возможные побочные действия

При появлении симптомов аллергии (зуд, покраснение кожи) немедленно снять пластырь.

Меры предосторожности при применении

Не применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки и истечения срока годности пластыря.

Описание принципов работы

Основаны на защите поврежденных кожных покровов от неблагоприятных воздействий внешних факторов путем создания механического барьера. Абсорбирующая подушечка предназначена для впитывания экссудата из ссадин, царапин, порезов, потертостей.

Способ применения

Тщательно очистить и продезинфицировать поврежденные кожные покровы и прилегающий к ней здоровый участок кожи. Накладывать пластырь только на сухую кожу. Извлечь пластырь из индивидуальной упаковки, снять защитный слой и, не прикасаясь к абсорбирующей подушечке пальцами, наложить на поврежденный участок кожи. Распределите пластырь равномерно, прижимая его по направлению от центра к краям. Края пластыря надежно зафиксировать, не допуская возникновения складок.

При удалении приподнимите уголок пластыря и снимите его, по направлению роста волос. При удалении держите пластырь параллельно поверхности кожи, медленно оттягивая его назад и придерживая кожу пальцем другой руки в течение всей процедуры снятия пластыря. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- пластыри одного наименования и кода в индивидуальных упаковках - в количестве, указанном в таблице, кроме Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S217, S218, S219),
- картонная коробка (инструкция отпечатана на самой коробке) - 1 шт.

- Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S217, S218, S219) в количестве, указанном в таблице без индивидуальной упаковки;

- картонная коробка (инструкция отпечатана на самой коробке) - 1 шт.

Таблица

	Наименование мед. изделия	код	Размер пластыря	Количество картонной паковки
1	Пластырь медицинский САРБАНТ классический	S210	19x72 мм	10
2	Пластырь медицинский САРБАНТ классический	S211	19x72 мм	20
3	Пластырь медицинский САРБАНТ цветной	S212	19x72 мм	20
4	Пластырь медицинский САРБАНТ ДИЗАЙН	S213	19x72 мм	20
5	Пластырь медицинский САРБАНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	S214	19x72мм; 16x57 мм; 25x72 мм; Ø22.5 мм	20
6	Пластырь медицинский САРБАНТ ПРОЗРАЧНЫЙ	S215	19x72 мм	20
7	Пластырь медицинский САРБАНТ КРУГЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ	S216	Ø22.5 мм	20
8	Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ	S217	6смx25см	2
9	Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ	S218	6смx10см	5
10	Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ	S219	6смx25см	4
11	Пластырь медицинский САРБАНТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ	S221	19x72 мм	10

Упаковка

Все пластыри, кроме Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S217, S218, S219), упаковываются в индивидуальную герметичную упаковку из влагопрочной бумаги (плотность 40-50 г/м²). Далее все пластыри укладываются в картонные коробки.

Пластырь медицинский САРБАНТ ЭКОНОМИЧНЫЙ (S217, S218, S219) без индивидуальной упаковки укладывается в картонную коробку.

Хранение и срок годности

Хранить в упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте при комнатной температуре от +15°C до +30°C, вдали от нагревательных приборов.

Срок годности пластыря 5 лет при хранении в оригинальной упаковке.

Транспортирование

Пластыри могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пластыря всем требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения на весь гарантийный срок.

Гарантийный срок годности 5 лет с даты изготовления.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Требования безопасности и охрана окружающей среды

В условиях эксплуатации пластырь должен быть нетоксичным и отвечать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения, не вызывать при контакте с кожей местно-раздражающих и аллергических эффектов.

Производство пластыря не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, sensibilizing воздействия на человека.

При пожаре для тушения следует использовать воду или огнетушители (порошковые, пенные или с CO₂).

Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

Использованный пластырь и пластырь с истекшим сроком следует утилизировать в емкости с бытовым мусором.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

CANSIN SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CANSIN SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSTASYON MAH. 1495. SOK. NO:17 GEBZE/KOCAELİ, TÜRKİYE
Tel.: +90 262 655 54 12-655 36 00 Faks: +90 262 656 64 88
e-mail : info@cansinbant.com.tr
www.cansinplast.com

(ДЖАНСИН САГЛЫК ГЕРЕЧЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.)

İSTASYON MAH. 1495. SOK. NO:17 GEBZE/KOCAELİ, TÜRKİYE

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

CANSIN SAĞLIK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., İstasyon Mah. 1495 Sk. No: 17 Gebze
Kocaeli/ TÜRKİYE.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АДД» (ООО «АДД»)

111024, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, корп.
1, помещ. 6/2

Тел. 8-951-904-38-46

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Тел. 8-951-904-38-46

KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tel:0216 395 46 30 - 0216 395 72 75
Fax:0216 395 63 97

KARTAL 12. NOTERİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN

02 Ekim 2024



KARTAL 12. NOTERİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN
Vekili
Başkatip Erdal KARATAŞ

/1-ая страница/

/Штамп:

12-АЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА КАРТАЛА

Джами Мах. Мимар Синан Джад.

№ 48/1 Тузла/СТАМБУЛ

Тел.: 0216 395 46 30 – 0216 395 72 75

Факс: 0216 395 63 97/

/Штамп:

НОТАРИУС 12-Й НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ КАРТАЛА

Мехмет Али ГЮНДОГАН/

ДЖАНСЫН САГЛЫК ГЕРЕЧЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.

ИСТАСЬОН МАХ. 1495. СОК. № 17 ГЕБЗЕ/КОДЖАЭЛИ, ТУРЦИЯ

Тел.: +90 262 655 54 12 – 655 36 00 Факс: +90 262 656 64 88

Эл.почта: inlo@cansinbant.com.tr

www.cansinplast.com

УТВЕРЖДАЮ

Директор по экспорту

Уфук Оздемир

/Штамп: 02 октября 2024/

/Штамп:

ДЖАНСЫН САГЛЫК ГЕРЕЧЛЕРИ

САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.

Истасьон Мах. 1495. Сок. № 17 Гебзе/КОДЖАЭЛИ

Тел.: +90 262 655 54 12 – 655 36 00 Факс: +90 262 656 64 88

Торг.рег.номер: (неразборчиво) Налоговое управление (неразборчиво)

Номер МЕРСИС (неразборчиво)/

/Подпись/

/Гербовая печать:

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДВЕНАДЦАТАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

КАРТАЛ

1923/

/Подпись/

/Штамп:

Заместитель

НОТАРИУСА 12-ОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОЫ КАРТАЛА

Мехмета Али ГЮНДОГАН

Главный секретарь Эрдал КАРАТАШ/

/10-ая страница/

/Штамп:

12-АЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА КАРТАЛА

Джамии Мах. Мимар Синан Джад.

№ 48/1 Тузла/СТАМБУЛ

Тел: 0216 395 46 30 – 0216 395 72 75

Факс: 0216 395 63 97/

/Штамп:

НОТАРИУС 12-Й НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ КАРТАЛА

Мехмет Али ГЮНДОГАН/

/Штамп: 02 октября 2024/

/Гербовая печать:

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДВЕНАДЦАТАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

КАРТАЛ

1923/

/Подпись/

/Штамп:


Заместитель

НОТАРИУСА 12-ОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ КАРТАЛА

Мехмета Али ГЮНДОГАН

Главный секретарь Эрдал КАРАТАШ/

Перевод данного текста выполнен переводчиком Егоровой Алиной Алексеевной.

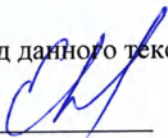

**Российская Федерация
Город Москва
Шестнадцатого октября две тысячи двадцать четвертого года**

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Егоровой Алины Алексеевны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2024-31- **80**
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью **12** лист(а)(ов)

Нотариус

