

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОЗ РИ
ООО «Объединение Альфапластик»

 С.Н. Мусатов
«01» 10 2024г.

Инструкция по эксплуатации
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94

2024

1. Назначение

Грелка резиновая типа А предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплектующими деталями).

2. Комплектность

Грелка резиновая типа А:

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Грелка резиновая типа Б:

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием - 1 шт.
3. Наконечники: для детей - 1 шт., для взрослых - шт., маточный - 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ - 1 шт.
5. Зажим - 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3 %-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5 %-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1 %-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3 %-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и повесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуются заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

4. Хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной

ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три)

____ листов

Директор ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»

С.Н. Мусатов

«17» октября 2024г.

