



УТВЕРЖДАЮ/ APPROVE

Директор/Director

«ДР ЛУИДЖИ, производство и торговля д.о.о.» /

DR LUIGI, proizvodnja i trgovina d.o.o.

Инга Велич/ Inga Velic

DrLuigi d.o.o.
SPLIT

23.10.2024

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / INSTRUCTION FOR USE

Обувь ортопедическая малосложная DrLuigi®/

Low-complexity orthopedic shoes DrLuigi®

(Версия 1.2 /Version 1.2)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Обувь ортопедическая малосложная «DrLuigi®»

(Версия 1.2)

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАИМЕНОВАНИЕ	3
2	СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
3	СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	4
4	НАЗНАЧЕНИЕ	5
5	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	5
6	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	5
7	ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	5
8	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
9	ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	6
10	КЛАССИФИКАЦИЯ	6
11	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	6
12	ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	6
13	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	41
13.1	Комплект поставки медицинского изделия	41
13.2	Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека).	41
13.3	Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения	59
13.4	Сведения о документах, подтверждающих качество лекарственного препарата, фармацевтической субстанции, биологического материала и иного вещества.	59
14	СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ	60
14.1	Сведения о маркировке изделия	60
14.2	Сведения о потребительской упаковке и маркировке	61
14.3	Сведения о транспортной упаковке и маркировке	62
15	ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ	65
16	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	66
17	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	66
18	ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ	67
19	ДАННЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	68
20	МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЧИСТКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ	68
20.1	Очистка и дезинфекция	68
20.2	Стерилизация	69
21	СРОК СЛУЖБЫ/ГОДНОСТИ	69
22	РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	69
23	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	69
24	РЕКЛАМАЦИИ	69

1 НАИМЕНОВАНИЕ

Обувь ортопедическая малосложная «DrLuigi®» (далее – «обувь», «изделие»),
в вариантах исполнения:

- I. Обувь ортопедическая малосложная DrLuigi® - 1 шт. (1 пара), в вариантах исполнения:**
1. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 2. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 3. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 4. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 5. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 6. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 7. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 8. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 9. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 10. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 11. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 12. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 13. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
 14. Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ серый/ черный;
 15. Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;
 16. Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ черный;
 17. Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;
 18. Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные с цветочками PU-02-61-KS, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый / малиновый;
 19. Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы текстильные летние PU-02-80-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий;
 20. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;

21. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;
22. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;
23. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;
24. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки детские PU-04-04-TP, размеры 22-34, цвет: красный / синий;
25. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке, подкладка кожаная PU-06-01-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий;
26. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка кожаная PU-06-10-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
27. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка меховая PU-06-20-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
28. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка текстильная PU-06-30-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
29. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка кожаная PU-06-40-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
30. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка меховая PU-06-50-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
31. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка текстильная PU-06-60-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
32. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка кожаная PU-06-70-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
33. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка меховая PU-06-80-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
34. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка текстильная PU-06-90-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий.

II. Инструкция по применению – 1 шт.

2 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование компании	DR LUIGI, proizvodnja i trgovina d.o.o. (ДрЛуиджи, производство и торговля д.о.о.), Хорватия
Адрес	DR LUIGI d. o. o. (ДрЛуиджи д.о.о.)
Телефон	BLAŽENOG IVANA MERZA 8, 21000 SPLIT, CROATIA
E-mail	+385 98 408264
Место производства	inga.velic@DrLuigi®.eu
	1. DR LUIGI d. o. o., TRG HRVATSKIH VELIKANA 1, 21276 VROGRAC, CROATIA

3 СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Наименование компании	Общество с ограниченной ответственностью «ДрЛуиджи» (ООО «ДрЛуиджи»)
Адрес	Россия, 141196, Московская Область, г.о. Щёлково, д. Богослово, пр-д Промышленный, владение 12, помещение 1,10,11
Телефон	8 (926)596 76 53

4 НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для поддержки, выравнивания, компенсации или коррекции деформаций стоп с целью улучшения их функции и/или осанки, а также для повышенного удобства использования за счет снижения давления на стопу, повышения вентилируемости, амортизации пяточного отдела, повышения равновесия и устойчивости при ходьбе детей, в том числе подросткового возраста и взрослых.

5 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия могут быть использованы для профилактики и лечения заболеваний нижних конечностей.

Обувь ортопедическая рекомендуется к применению людям, у которых имеются:

- состояния после перенесенных операций на нижних конечностях и позвоночнике;
- сахарный диабет (диабетическая стопа);
- молоткообразный палец (digitus malleus);
- клещеобразный палец (digitus flexus);
- ригидный палец стопы (hallus rigidus);
- вальгусная деформация (hallux valgus);
- плоскостопие;
- подошвенный фасциит;
- болезнь мортон;
- артроз;
- косолапость;
- парезы и параличи нижних конечностей;
- ДЦП;
- отеки стоп различной этиологии (лимфостаз).

6 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютные противопоказания не выявлены. Сверхчувствительные реакции, опасные для здоровья, на настоящий момент не зафиксированы.

В следующих случаях изделия могут применяться после консультации со специалистом:

- наличие открытых ран / травм стопы;
- при индивидуальной непереносимости материалов;
- диабетическая стопа;
- ревматоидный артрит суставов нижних конечностей III - IV степени;
- наличие в области стопы контактных дерматитов;
- язв с мокнутием;
- ампутационные культя пальцев стоп.

7 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Отсутствуют.

8 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия могут быть использованы для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов.

Может применяться в реабилитационно-оздоровительных центрах, медицинских учреждениях, санаториях, профилакториях, так же для повседневного (летнего, зимнего, весенне-осеннего, круглогодичного) и домашнего использования.

Изделия используются в области педиатрии, сосудистой хирургии, ортопедии, дерматологии, эндокринологии, неврологии.

9 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Предназначенные пользователи: пациент, медицинский работник, врач.

Потребители - все возрастные категории: дети, в том числе подросткового возраста, и взрослые любой половой принадлежности.

Наличие у потребителя специального образования не требуется.

10 КЛАССИФИКАЦИЯ

Вид медицинского изделия - 250220

Медицинское изделие низкого класса риска – 1.

Изделие кратковременного контакта (менее 24 ч.) с неповрежденной кожей. Предназначены для многократного применения.

Изделие в зависимости от воспринимаемых механических воздействий группы 2 - носимые, переносные и передвижные, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах стационарного помещения

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям изделия, все части которых эксплуатируются в нормальных условиях в воздушной среде - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

11 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При покупке обуви необходимо правильно подбирать обувь по размеру ноги.

Не рекомендуется использовать новую обувь для длительных путешествий, т.к. требуется некоторое время, чтобы обувь приняла индивидуальную форму стопы;

При надевании обуви обязательно расшнуровывайте шнурки, ремешки, «липучку», молнию и всегда пользуйтесь рожек для обуви (во избежание заломов задника).

Перед снятием обуви ослабьте шнурки, ремешок, «липучку» или молнию (при наличии), а потом снимайте, придерживая рукой. Никогда не снимайте обувь, наступая на задник (при наличии).

Не перетягивайте шнурки в районе голеностопа во избежание разрыва верха обуви.

Обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. не является непромокаемой (такие как обувь из резины).

При повышенной потливости ног или намокании обуви может окраситься изнутри. Это не является дефектом.

Не надевайте обувь на голую ногу, кроме обуви летней: сандалии, шлепанцы, вьетнамки.

Запрещается: мыть обувь, опуская ее в воду, подвергать обувь воздействию кислот, щелочей, растворителей и воздействиям механического характера (удары, порезы и т.д.).

Не допускается контакт обуви с концентрированными растворами кислот, щелочей, красящими веществами, нефтепродуктами и растворителями.

Не допускается сушить обувь на нагревательных поверхностях.

12 ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Описание медицинского изделия см. в Таблице 1 ниже

Допустимы отклонения характеристик в пределах $\pm 10\%$, если не указано иное.

Малосложная ортопедическая обувь предназначена для широкого населения (профилактика и предотвращение развития многих болезней нижних конечностей) а особенно для людей с

деформациями стоп, болеющим артритом, остеопорозом, диабетом, плоскостопием и т.п. Это обувь не лечит, но гораздо облегчает боль в случае упомянутых показаний. Она включает в себя встроенные или вкладные корректирующие элементы.

Подошва анатомически сформирована (продольные и поперечные стельки) и она адаптируется характеристикам каждой стопы - самая уникальная особенность ДрЛунджи подошвы это ее гибкость и упругость - подошва не продавливается под весом и является отличным амортизатором - поглощает удары пятки о поверхность таким образом снимает нагрузку с позвоночника/ суставов , облегчает венозный стресс. ДрЛунджи подошва не изнашивается (всегда сохраняет свои качества), так как сделана из специальной формулы полиуретана. Секрет нашей обуви в эргономических свойствах подошвы.

Изделия по методу крепления относятся к прессовой вулканизации: Обувь, подошва которой при формировании в вулканизационных прессах одновременно прикрепляется к объемной заготовке верха или заготовке верха со свободной затяжной кромкой.

Ортопедические элементы:

- специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, при
- межстельные слои: выкладка сводов (наружного, внутреннего, поперечного), супинатор, прона
- специальные детали низа: каблук и подошва особой формы.

Обувь может быть изготовлена асимметричной в паре.

Описание медицинского изделия см. в Таблице 1 ниже

Допустимы отклонения характеристик в пределах $\pm 10 \%$, если не указано иное

Таблица 1 – Описание и технические характеристики медицинского изделия

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																								
1.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый/розовый/ сиреневый/ малиновый/красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: коричневый, розовый, сиреневый, малиновые, красный, голубой, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы – не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,25</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>111</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>117</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>123</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>129</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>135</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>141</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>147</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>153</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>159</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>164</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>171</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,25	21,6	5,8	111	37	24,0	8,50	22,0	5,9	117	38	24,6	8,75	22,4	6,0	123	39	25,3	9,00	22,8	6,1	129	40	26,0	9,25	23,2	6,2	135	41	26,6	9,50	23,6	6,3	141	42	27,3	9,75	24,0	6,4	147	43	28,0	10,00	24,4	6,5	153	44	28,6	10,25	24,8	6,6	159	45	29,3	10,50	25,2	6,7	164	46	30,0	10,75	25,6	6,8	171
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																																							
36	23,3	8,25	21,6	5,8	111																																																																							
37	24,0	8,50	22,0	5,9	117																																																																							
38	24,6	8,75	22,4	6,0	123																																																																							
39	25,3	9,00	22,8	6,1	129																																																																							
40	26,0	9,25	23,2	6,2	135																																																																							
41	26,6	9,50	23,6	6,3	141																																																																							
42	27,3	9,75	24,0	6,4	147																																																																							
43	28,0	10,00	24,4	6,5	153																																																																							
44	28,6	10,25	24,8	6,6	159																																																																							
45	29,3	10,50	25,2	6,7	164																																																																							
46	30,0	10,75	25,6	6,8	171																																																																							

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																								
2.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый/розовый/ сиреневый/ малиновый/красный/ голубой/синий/ зеленый/серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин с пяточной шпорой, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из полиуретана. Пяточная шпора встраивается в подошву в процессе литья полиуретана в колодку и в то же время крепится стелька. Цветовые варианты исполнений: коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, голубой, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,25</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>120</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>120</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>130</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>130</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>135</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>140</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>140</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>145</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>145</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>145</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>150</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,25	21,6	5,8	120	37	24,0	8,50	22,0	5,9	120	38	24,6	8,75	22,4	6,0	130	39	25,3	9,00	22,8	6,1	130	40	26,0	9,25	23,2	6,2	135	41	26,6	9,50	23,6	6,3	140	42	27,3	9,75	24,0	6,4	140	43	28,0	10,00	24,4	6,5	145	44	28,6	10,25	24,8	6,6	145	45	29,3	10,50	25,2	6,7	145	46	30,0	10,75	25,6	6,8	150
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																																							
36	23,3	8,25	21,6	5,8	120																																																																							
37	24,0	8,50	22,0	5,9	120																																																																							
38	24,6	8,75	22,4	6,0	130																																																																							
39	25,3	9,00	22,8	6,1	130																																																																							
40	26,0	9,25	23,2	6,2	135																																																																							
41	26,6	9,50	23,6	6,3	140																																																																							
42	27,3	9,75	24,0	6,4	140																																																																							
43	28,0	10,00	24,4	6,5	145																																																																							
44	28,6	10,25	24,8	6,6	145																																																																							
45	29,3	10,50	25,2	6,7	145																																																																							
46	30,0	10,75	25,6	6,8	150																																																																							

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики												
3.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть и стелька выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>47</td><td>30,6</td><td>11,0</td><td>26,0</td><td>6,9</td><td>111</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	47	30,6	11,0	26,0	6,9	111
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
47	30,6	11,0	26,0	6,9	111											
4.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля,	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а												

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики												
			подошва - из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий, зеленый, серый, черный	конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>48</td><td>31,3</td><td>11,25</td><td>26,6</td><td>7,0</td><td>111</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	48	31,3	11,25	26,6	7,0	111
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
48	31,3	11,25	26,6	7,0	111											
5.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32												

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики												
				Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>49</td><td>32,0</td><td>11,50</td><td>26,8</td><td>7,1</td><td>111</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	49	32,0	11,50	26,8	7,1	111
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
49	32,0	11,50	26,8	7,1	111											
6.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть и стелька выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>50</td><td>32,6</td><td>11,75</td><td>27,2</td><td>7,2</td><td>111</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	50	32,6	11,75	27,2	7,2	111
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
50	32,6	11,75	27,2	7,2	111											

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																												
7.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: коричневый/розовый/ сиреневый/ малиновый/красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	     	Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, голубой, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. Высота задников: 72 мм (±15%) Остаточная деформация задника – не более 1 мм. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,50</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>145</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>150</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>150</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>160</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>165</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>165</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>165</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>170</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>170</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,50	21,6	5,8	145	37	24,0	8,50	22,0	5,9	150	38	24,6	8,75	22,4	6,0	150	39	25,3	9,00	22,8	6,1	160	40	26,0	9,25	23,2	6,2	165	41	26,6	9,50	23,6	6,3	165	42	27,3	9,75	24,0	6,4	165	43	28,0	10,00	24,4	6,5	170	44	28,6	10,25	24,8	6,6	170
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																											
36	23,3	8,50	21,6	5,8	145																																																											
37	24,0	8,50	22,0	5,9	150																																																											
38	24,6	8,75	22,4	6,0	150																																																											
39	25,3	9,00	22,8	6,1	160																																																											
40	26,0	9,25	23,2	6,2	165																																																											
41	26,6	9,50	23,6	6,3	165																																																											
42	27,3	9,75	24,0	6,4	165																																																											
43	28,0	10,00	24,4	6,5	170																																																											
44	28,6	10,25	24,8	6,6	170																																																											

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики					
				45	29,3	10,50	25,2	6,7	175
				46	30,0	10,75	25,6	6,8	175
8.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/		Универсальная модель для женщин и мужчин с перфорированной верхней частью обуви. Верхняя часть, стелька, подкладка и лента для окантовки выполнены из кожи, подошва – из полиуретана.	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).					

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																								
	малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, синий, зеленый, серый, черный.	Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,70</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>115</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,70</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>115</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>130</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>130</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>140</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>150</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>155</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>160</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>165</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>170</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>180</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,70	21,6	5,8	115	37	24,0	8,70	22,0	5,9	115	38	24,6	8,75	22,4	6,0	130	39	25,3	9,00	22,8	6,1	130	40	26,0	9,25	23,2	6,2	140	41	26,6	9,50	23,6	6,3	150	42	27,3	9,75	24,0	6,4	155	43	28,0	10,00	24,4	6,5	160	44	28,6	10,25	24,8	6,6	165	45	29,3	10,50	25,2	6,7	170	46	30,0	10,75	25,6	6,8	180
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																																							
36	23,3	8,70	21,6	5,8	115																																																																							
37	24,0	8,70	22,0	5,9	115																																																																							
38	24,6	8,75	22,4	6,0	130																																																																							
39	25,3	9,00	22,8	6,1	130																																																																							
40	26,0	9,25	23,2	6,2	140																																																																							
41	26,6	9,50	23,6	6,3	150																																																																							
42	27,3	9,75	24,0	6,4	155																																																																							
43	28,0	10,00	24,4	6,5	160																																																																							
44	28,6	10,25	24,8	6,6	165																																																																							
45	29,3	10,50	25,2	6,7	170																																																																							
46	30,0	10,75	25,6	6,8	180																																																																							
9.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/		Универсальная модель для женщин и мужчин 47 размера, верхняя часть, стелька, подкладка и лента для окантовки выполнены из кожи, подкладка - из текстиля, подошва – из полиуретана.	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).																																																																								

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики												
	зеленый/ серый/ черный;		Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, синий, зеленый, серый, черный.	Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>47</td><td>30,6</td><td>11,0</td><td>26,0</td><td>6,9</td><td>190</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	47	30,6	11,0	26,0	6,9	190
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
47	30,6	11,0	26,0	6,9	190											
10	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48- 01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин 48 размера, верхняя часть, стелька и лента для окантовки выполнены из кожи, подкладка - из текстиля, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, синий, зеленый, серый, черный.	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не												

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики												
				менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>48</td><td>31,3</td><td>11,25</td><td>26,6</td><td>7,0</td><td>190</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	48	31,3	11,25	26,6	7,0	190
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
48	31,3	11,25	26,6	7,0	190											
11	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин 49 размера, верхняя часть, стелька, подкладка и лента для окантовки выполнены из кожи, подкладка - из текстиля, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, синий, зеленый, серый, черный.	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>49</td><td>32,0</td><td>11,50</td><td>26,8</td><td>7,1</td><td>200</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	49	32,0	11,50	26,8	7,1	200
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
49	32,0	11,50	26,8	7,1	200											
12	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо		Универсальная модель для женщин и	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм												

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики												
	кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		мужчин 50 размера, верхняя часть, стелька, подкладка и лента для окантовки выполнены из кожи, подкладка - из текстиля, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, синий, зеленый, серый, черный.	Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части.												
				<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>50</td><td>32,6</td><td>11,75</td><td>27,2</td><td>7,2</td><td>200</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	50	32,6	11,75	27,2	7,2	200
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)											
50	32,6	11,75	27,2	7,2	200											
13	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/		Универсальная модель для женщин и мужчин с пяточной шпорой, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из натуральной кожи, лента для окантовки – из текстиля, подошва - из	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).												

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																								
	розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;		полиуретана. Пяточная шпора встраивается в подошву в процессе литья полиуретана в колодку и в то же время крепится стелька. Внешне модель не отличается от Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01- 11-KS. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, синий, зеленый, серый, черный.	Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 25 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,50</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>145</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>150</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>160</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>160</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>170</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>170</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>175</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>175</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>180</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>180</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>195</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,50	21,6	5,8	145	37	24,0	8,50	22,0	5,9	150	38	24,6	8,75	22,4	6,0	160	39	25,3	9,00	22,8	6,1	160	40	26,0	9,25	23,2	6,2	170	41	26,6	9,50	23,6	6,3	170	42	27,3	9,75	24,0	6,4	175	43	28,0	10,00	24,4	6,5	175	44	28,6	10,25	24,8	6,6	180	45	29,3	10,50	25,2	6,7	180	46	30,0	10,75	25,6	6,8	195
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																																							
36	23,3	8,50	21,6	5,8	145																																																																							
37	24,0	8,50	22,0	5,9	150																																																																							
38	24,6	8,75	22,4	6,0	160																																																																							
39	25,3	9,00	22,8	6,1	160																																																																							
40	26,0	9,25	23,2	6,2	170																																																																							
41	26,6	9,50	23,6	6,3	170																																																																							
42	27,3	9,75	24,0	6,4	175																																																																							
43	28,0	10,00	24,4	6,5	175																																																																							
44	28,6	10,25	24,8	6,6	180																																																																							
45	29,3	10,50	25,2	6,7	180																																																																							
46	30,0	10,75	25,6	6,8	195																																																																							

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																						
14	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ серый/ черный;	       	Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, синий, зеленый, серый, черный	Прочность на разрыв верха: 93 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,33 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,25</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>150</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>155</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>160</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>165</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>170</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>175</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>178</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>180</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,25	21,6	5,8	150	37	24,0	8,50	22,0	5,9	155	38	24,6	8,75	22,4	6,0	160	39	25,3	9,00	22,8	6,1	165	40	26,0	9,25	23,2	6,2	170	41	26,6	9,50	23,6	6,3	175	42	27,3	9,75	24,0	6,4	178	43	28,0	10,00	24,4	6,5	180
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																					
36	23,3	8,25	21,6	5,8	150																																																					
37	24,0	8,50	22,0	5,9	155																																																					
38	24,6	8,75	22,4	6,0	160																																																					
39	25,3	9,00	22,8	6,1	165																																																					
40	26,0	9,25	23,2	6,2	170																																																					
41	26,6	9,50	23,6	6,3	175																																																					
42	27,3	9,75	24,0	6,4	178																																																					
43	28,0	10,00	24,4	6,5	180																																																					

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики
				
15	Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый и черный.	Прочность на разрыв верха: 93 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,1 Н/мм ($\pm 15\%$) Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,33 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части.

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики					
				Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)
				36	23,3	8,50	21,6	5,8	110
				37	24,0	8,50	22,0	5,9	120
				38	24,6	8,75	22,4	6,0	130
				39	25,3	9,00	22,8	6,1	130
				40	26,0	9,25	23,2	6,2	140
				41	26,6	9,50	23,6	6,3	140
				42	27,3	9,75	24,0	6,4	150
				43	28,0	10,00	24,4	6,5	180
				44	28,6	10,25	24,8	6,6	190
				45	29,3	10,50	25,2	6,7	200
				46	30,0	10,75	25,6	6,8	220

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики
16	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ черный;		Женская модель, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, синий, зеленый, серый, черный.	Прочность на разрыв верха: 93 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,33 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части.

Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)
36	23,3	8,25	21,6	5,8	110
37	24,0	8,50	22,0	5,9	110
38	24,6	8,75	22,4	6,0	110
39	25,3	9,00	22,8	6,1	110
40	26,0	9,25	23,2	6,2	115
41	26,6	9,50	23,6	6,3	115
42	27,3	9,75	24,0	6,4	120
43	28,0	10,00	24,4	6,5	120

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики
		   		

17 Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый / коричневый / черный;



Мужская модель, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый и черный.

Прочность на разрыв верха: 49 Н
Прочность крепления верха с подошвой: 3,2 Н/мм
Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части
Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0 мм
Особые эргономические свойства:
Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).
Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Опускание легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние.
Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,33
Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части.

Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)
39	25,3	9,00	22,8	6,1	125
40	26,0	9,25	23,2	6,2	125
41	26,6	9,50	23,6	6,3	145
42	27,3	9,75	24,0	6,4	145
43	28,0	10,00	24,4	6,5	145
44	28,6	10,25	24,8	6,6	150
45	29,3	10,50	25,2	6,7	150
46	30,0	10,75	25,6	6,8	150

18 Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные с цветочками PU-02-61-KS, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый / малиновый;



Женская модель, стелька выполнена из кожи, верхняя часть, стелька и подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется фурнитуры в виде цветочков. Изготовлены из кожи. Цветовые варианты исполнений: белый, малиновый.

Прочность на разрыв верха: 93 Н
Прочность крепления верха с подошвой: 4,1 Н/мм
Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части
Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0 мм
Особые эргономические свойства:
Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).
Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние.
Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,33
Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части.

Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Пальмота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)
36	23,3	8,70	21,6	5,8	110
37	24,0	8,70	22,0	5,9	115
38	24,6	8,75	22,4	6,0	115
39	25,3	9,00	22,8	6,1	120
40	26,0	9,25	23,2	6,2	120
41	26,6	9,50	23,6	6,3	125
42	27,3	9,75	24,0	6,4	125
43	28,0	10,00	24,4	6,5	130

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																								
19	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы текстильные летние PU-02-80-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька, подкладка выполнены из махрового текстиля лента для окантовки - из текстиля, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: синий.	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 3,8 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,33 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>36</td><td>23,3</td><td>8,70</td><td>21,6</td><td>5,8</td><td>110</td></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,70</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>115</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>115</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>120</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>120</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>125</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>125</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>135</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>135</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>155</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>155</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	36	23,3	8,70	21,6	5,8	110	37	24,0	8,70	22,0	5,9	115	38	24,6	8,75	22,4	6,0	115	39	25,3	9,00	22,8	6,1	120	40	26,0	9,25	23,2	6,2	120	41	26,6	9,50	23,6	6,3	125	42	27,3	9,75	24,0	6,4	125	43	28,0	10,00	24,4	6,5	135	44	28,6	10,25	24,8	6,6	135	45	29,3	10,50	25,2	6,7	155	46	30,0	10,75	25,6	6,8	155
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																																							
36	23,3	8,70	21,6	5,8	110																																																																							
37	24,0	8,70	22,0	5,9	115																																																																							
38	24,6	8,75	22,4	6,0	115																																																																							
39	25,3	9,00	22,8	6,1	120																																																																							
40	26,0	9,25	23,2	6,2	120																																																																							
41	26,6	9,50	23,6	6,3	125																																																																							
42	27,3	9,75	24,0	6,4	125																																																																							
43	28,0	10,00	24,4	6,5	135																																																																							
44	28,6	10,25	24,8	6,6	135																																																																							
45	29,3	10,50	25,2	6,7	155																																																																							
46	30,0	10,75	25,6	6,8	155																																																																							

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																												
20	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	     	Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть, стелька и лента для окантовки выполнены из кожи, подкладка - из текстиля, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: белый, бежевый, коричневый, розовый, сиреневый, малиновый, красный, синий, зеленый, серый, черный.	Прочность на разрыв верха: 30,6 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,3 Н/мм (±15%) Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части.																																																												
<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>105</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>105</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>110</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>110</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>115</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>115</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>120</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>120</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>125</td></tr></table>					Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)	38	24,6	8,75	22,4	6,0	105	39	25,3	9,00	22,8	6,1	105	40	26,0	9,25	23,2	6,2	110	41	26,6	9,50	23,6	6,3	110	42	27,3	9,75	24,0	6,4	115	43	28,0	10,00	24,4	6,5	115	44	28,6	10,25	24,8	6,6	120	45	29,3	10,50	25,2	6,7	120	46	30,0	10,75	25,6	6,8	125
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																											
38	24,6	8,75	22,4	6,0	105																																																											
39	25,3	9,00	22,8	6,1	105																																																											
40	26,0	9,25	23,2	6,2	110																																																											
41	26,6	9,50	23,6	6,3	110																																																											
42	27,3	9,75	24,0	6,4	115																																																											
43	28,0	10,00	24,4	6,5	115																																																											
44	28,6	10,25	24,8	6,6	120																																																											
45	29,3	10,50	25,2	6,7	120																																																											
46	30,0	10,75	25,6	6,8	125																																																											

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики
				

21 Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;



Универсальная модель для мальчиков и девочек, стелька, верхняя часть и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва – из полиуретана. Имеется принт в виде эмблемы герба. Цветовые варианты исполнений: розовый, красный, голубой, синий. Подходит детям от 1,2 года до 7 лет.

Прочность на разрыв верха: 40,9 Н
Прочность крепления верха с подошвой: 4,1 Н/мм ($\pm 15\%$)
Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части
Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм
Особые эргономические свойства:
Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).
Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние.
Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы – не менее 0,29; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32
Толщина подошвы, не менее: 8 мм в части перегиба пальцев и не менее 15 мм в пяточной части.
Высота задников: 50 мм
Остаточная деформация задника – не более 1 мм.

Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Возраст, лет	Масса полупары (эталона), г ($\pm 10\%$)
22	14	6	13,5	3,5	2-3	50
24	15	6	14,5	3,7	3-4	55
26	16	6	15,5	3,9	4-5	60
28	17	6	16,5	4,1	5-6	65
30	18	6,5	17,5	4,3	6-7	70
32	19	7	18,5	4,5	7-8	75
34	20	7,5	19,5	4,7	8-9	80

22 Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;



Универсальная модель для мальчиков и девочек, стелька, верхняя часть и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги и принт в виде эмблемы герба. Цветовые варианты исполнений: розовый, красный, голубой, синий. Подходит детям от 1,2 года до 7 лет.

Прочность на разрыв верха: 40,9 Н
Прочность крепления верха с подошвой: 4,1 Н/мм ($\pm 15\%$)
Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части
Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм
Особые эргономические свойства:
Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).
Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние.
Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32
Толщина подошвы, не менее: 8 мм в части перегиба пальцев и не менее 15 мм в пяточной части.
Высота задников: 70 мм
Остаточная деформация задника – не более 1 мм.

Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Возраст, лет	Масса полушляпы (эталона), г ($\pm 10\%$)
22	14	4,5	13,5	3,5	2-3	80
24	15	5	14,5	3,7	3-4	85
26	16	5,5	15,5	3,9	4-5	85
28	17	6	16,5	4,1	5-6	95
30	18	6,5	17,5	4,3	6-7	95
32	19	7	18,5	4,5	7-8	100
34	20	7,5	19,5	4,7	8-9	100

23	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;		Универсальная модель для мальчиков и девочек, стелька, верхняя часть и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная молния и принт в виде эмблемы герба. Цветовые варианты исполнений: розовый, красный, голубой, синий. Подходит детям от 1,2 года до 7 лет.	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,1 Н/мм (±15%) Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 8 мм в части перегиба пальцев и не менее 15 мм в пяточной части. Высота задников: 70 мм Остаточная деформация задника – не более 1 мм. <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Возраст, лет</th><th>Масса полупары (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>22</td><td>14</td><td>4,5</td><td>13,5</td><td>3,5</td><td>2-3</td><td>100</td></tr><tr><td>24</td><td>15</td><td>5</td><td>14,5</td><td>3,7</td><td>3-4</td><td>100</td></tr><tr><td>26</td><td>16</td><td>5,5</td><td>15,5</td><td>3,9</td><td>4-5</td><td>100</td></tr><tr><td>28</td><td>17</td><td>6</td><td>16,5</td><td>4,1</td><td>5-6</td><td>100</td></tr><tr><td>30</td><td>18</td><td>6,5</td><td>17,5</td><td>4,3</td><td>6-7</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>19</td><td>7</td><td>18,5</td><td>4,5</td><td>7-8</td><td>100</td></tr><tr><td>34</td><td>20</td><td>7,5</td><td>19,5</td><td>4,7</td><td>8-9</td><td>100</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Возраст, лет	Масса полупары (эталона), г (±10%)	22	14	4,5	13,5	3,5	2-3	100	24	15	5	14,5	3,7	3-4	100	26	16	5,5	15,5	3,9	4-5	100	28	17	6	16,5	4,1	5-6	100	30	18	6,5	17,5	4,3	6-7	100	32	19	7	18,5	4,5	7-8	100	34	20	7,5	19,5	4,7	8-9	100
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Возраст, лет	Масса полупары (эталона), г (±10%)																																																						
22	14	4,5	13,5	3,5	2-3	100																																																						
24	15	5	14,5	3,7	3-4	100																																																						
26	16	5,5	15,5	3,9	4-5	100																																																						
28	17	6	16,5	4,1	5-6	100																																																						
30	18	6,5	17,5	4,3	6-7	100																																																						
32	19	7	18,5	4,5	7-8	100																																																						
34	20	7,5	19,5	4,7	8-9	100																																																						

24	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки детские PU-04-04-TP, размеры 22-34, цвет: красный / синий;		Универсальная модель для мальчиков и девочек, стелька, верхняя часть и подкладка выполнены из махрового текстиля, лента для окантовки – из текстиля, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнений: красный и синий. Подходит детям от 1,2 года до 7 лет.	Прочность на разрыв верха: 40,9 Н Прочность крепления верха с подошвой: 4,1 Н/мм ($\pm 15\%$) Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы: 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,29; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 8 мм в части перегиба пальцев и не менее 15 мм в пяточной части.	<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Возраст, лет</th><th>Масса полупары (эталона), г ($\pm 10\%$)</th></tr><tr><td>22</td><td>14</td><td>4,5</td><td>13,5</td><td>3,5</td><td>2-3</td><td>80</td></tr><tr><td>24</td><td>15</td><td>5</td><td>14,5</td><td>3,7</td><td>3-4</td><td>100</td></tr><tr><td>26</td><td>16</td><td>5,5</td><td>15,5</td><td>3,9</td><td>4-5</td><td>100</td></tr><tr><td>28</td><td>17</td><td>6</td><td>16,5</td><td>4,1</td><td>5-6</td><td>100</td></tr><tr><td>30</td><td>18</td><td>6,5</td><td>17,5</td><td>4,3</td><td>6-7</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>19</td><td>7</td><td>18,5</td><td>4,5</td><td>7-8</td><td>100</td></tr><tr><td>34</td><td>20</td><td>7,5</td><td>19,5</td><td>4,7</td><td>8-9</td><td>100</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Возраст, лет	Масса полупары (эталона), г ($\pm 10\%$)	22	14	4,5	13,5	3,5	2-3	80	24	15	5	14,5	3,7	3-4	100	26	16	5,5	15,5	3,9	4-5	100	28	17	6	16,5	4,1	5-6	100	30	18	6,5	17,5	4,3	6-7	100	32	19	7	18,5	4,5	7-8	100	34	20	7,5	19,5	4,7	8-9	100
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Возраст, лет	Масса полупары (эталона), г ($\pm 10\%$)																																																							
22	14	4,5	13,5	3,5	2-3	80																																																							
24	15	5	14,5	3,7	3-4	100																																																							
26	16	5,5	15,5	3,9	4-5	100																																																							
28	17	6	16,5	4,1	5-6	100																																																							
30	18	6,5	17,5	4,3	6-7	100																																																							
32	19	7	18,5	4,5	7-8	100																																																							
34	20	7,5	19,5	4,7	8-9	100																																																							

25 Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке, подкладка кожаная PU-06-01-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий;



Универсальная модель для женщин и мужчин, стелька, верхняя часть подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Цветовые варианты исполнения: синий

Прочность на разрыв верха: 80 Н
 Прочность крепления верха с подошвой: 4,0 Н/мм
 Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части
 Устойчивость к многократному изгибу подошвы (увеличение разреза): 0,5 мм
 Особые эргономические свойства:
 Используемые материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор).
 Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Онушение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние.
 Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,33; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32
 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части.
 Высота задников: 63 мм
 Остаточная деформация задника – не более 1 мм.

Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полуботинки (эталона), г (±10%)
37	24,0	8,50	22,0	5,9	150
38	24,6	8,75	22,4	6,0	150
39	25,3	9,00	22,8	6,1	150
40	26,0	9,25	23,2	6,2	155
41	26,6	9,50	23,6	6,3	155
42	27,3	9,75	24,0	6,4	155
43	28,0	10,00	24,4	6,5	155
44	28,6	10,25	24,8	6,6	160
45	29,3	10,50	25,2	6,7	160
46	30,0	10,75	25,6	6,8	160

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																										
26	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка кожаная PU-06-10-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	 	Универсальная модель для женщин и мужчин, стелька, верхняя часть подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	Прочность на разрыв верха: 92 Н (±15%) Прочность крепления верха с подошвой: 4,0 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы (увеличение разреза): 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,33; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части. Высота задников: 63 мм Остаточная деформация задника – не более 1 мм.																																										
27	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка меховая PU-06-20-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть выполнена из кожи, стелька и подкладка - из овчинного меха подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно	<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары PU-06-10-KK (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>145</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>150</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>150</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>155</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>155</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>160</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары PU-06-10-KK (эталона), г (±10%)	37	24,0	8,50	22,0	5,9	145	38	24,6	8,75	22,4	6,0	150	39	25,3	9,00	22,8	6,1	150	40	26,0	9,25	23,2	6,2	155	41	26,6	9,50	23,6	6,3	155	42	27,3	9,75	24,0	6,4	160
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары PU-06-10-KK (эталона), г (±10%)																																									
37	24,0	8,50	22,0	5,9	145																																									
38	24,6	8,75	22,4	6,0	150																																									
39	25,3	9,00	22,8	6,1	150																																									
40	26,0	9,25	23,2	6,2	155																																									
41	26,6	9,50	23,6	6,3	155																																									
42	27,3	9,75	24,0	6,4	160																																									

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																						
			изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	43	28,0	10,00	24,4	6,5	160																																	
				44	28,6	10,25	24,8	6,6	165																																	
				45	29,3	10,50	25,2	6,7	165																																	
				46	30,0	10,75	25,6	6,8	170																																	
28	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка текстильная PU-06-30-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть выполнена из кожи, стелька и подкладка из текстиля, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Масса полупары PU-06-20-КК (эталона), г (±10%)</th><th>Масса полупары PU-06-30-КК (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>37</td><td>170</td><td>165</td></tr><tr><td>38</td><td>175</td><td>170</td></tr><tr><td>39</td><td>175</td><td>180</td></tr><tr><td>40</td><td>180</td><td>180</td></tr><tr><td>41</td><td>180</td><td>185</td></tr><tr><td>42</td><td>185</td><td>185</td></tr><tr><td>43</td><td>185</td><td>190</td></tr><tr><td>44</td><td>190</td><td>190</td></tr><tr><td>45</td><td>195</td><td>195</td></tr><tr><td>46</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>						Размер (типоразмерный ряд)	Масса полупары PU-06-20-КК (эталона), г (±10%)	Масса полупары PU-06-30-КК (эталона), г (±10%)	37	170	165	38	175	170	39	175	180	40	180	180	41	180	185	42	185	185	43	185	190	44	190	190	45	195	195	46	200	200
Размер (типоразмерный ряд)	Масса полупары PU-06-20-КК (эталона), г (±10%)	Масса полупары PU-06-30-КК (эталона), г (±10%)																																								
37	170	165																																								
38	175	170																																								
39	175	180																																								
40	180	180																																								
41	180	185																																								
42	185	185																																								
43	185	190																																								
44	190	190																																								
45	195	195																																								
46	200	200																																								
29	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка кожаная PU-06-40-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с		Универсальная модель для женщин и мужчин, стелька, верхняя часть подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная	Прочность на разрыв верха: 92 Н (±15%) Прочность крепления верха с подошвой: 4,0 Н/мм (±15%) Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы (увеличение разреза): 0,5 мм Особые эргономические свойства: Используемые материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а																																						

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																								
	шагом 1, цвет: коричневый/синий;		застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке подошвы - не менее 0,33; скольжение по всей поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части. Высота задников: 63 мм (±15%) Остаточная деформация задника – не более 1 мм.																																																																								
30	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка меховая PU-06-50-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть выполнена из кожи, стелька и подкладка - из овчинного меха подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары PU-06-40- КК (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>165</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>180</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>180</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>190</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>190</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>200</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>200</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>220</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>220</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>230</td></tr></table> <table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Масса полупары PU-06-50-КК (эталона), г (±10%)</th><th>Масса полупары PU- 06-60-КК (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>37</td><td>160</td><td>190</td></tr></table>	Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары PU-06-40- КК (эталона), г (±10%)	37	24,0	8,50	22,0	5,9	165	38	24,6	8,75	22,4	6,0	180	39	25,3	9,00	22,8	6,1	180	40	26,0	9,25	23,2	6,2	190	41	26,6	9,50	23,6	6,3	190	42	27,3	9,75	24,0	6,4	200	43	28,0	10,00	24,4	6,5	200	44	28,6	10,25	24,8	6,6	220	45	29,3	10,50	25,2	6,7	220	46	30,0	10,75	25,6	6,8	230	Размер (типоразмерный ряд)	Масса полупары PU-06-50-КК (эталона), г (±10%)	Масса полупары PU- 06-60-КК (эталона), г (±10%)	37	160	190
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары PU-06-40- КК (эталона), г (±10%)																																																																							
37	24,0	8,50	22,0	5,9	165																																																																							
38	24,6	8,75	22,4	6,0	180																																																																							
39	25,3	9,00	22,8	6,1	180																																																																							
40	26,0	9,25	23,2	6,2	190																																																																							
41	26,6	9,50	23,6	6,3	190																																																																							
42	27,3	9,75	24,0	6,4	200																																																																							
43	28,0	10,00	24,4	6,5	200																																																																							
44	28,6	10,25	24,8	6,6	220																																																																							
45	29,3	10,50	25,2	6,7	220																																																																							
46	30,0	10,75	25,6	6,8	230																																																																							
Размер (типоразмерный ряд)	Масса полупары PU-06-50-КК (эталона), г (±10%)	Масса полупары PU- 06-60-КК (эталона), г (±10%)																																																																										
37	160	190																																																																										
31	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя																																																																									

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики		
	шнуровке с петлями, подкладка текстильная PU-06- 60-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;		часть выполнена из кожи, стелька и подкладка из текстиля, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	38	160	195
				39	165	195
				40	165	200
				41	170	200
				42	170	205
				43	175	205
				44	175	205
				45	180	210
				46	180	210
32	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка кожаная PU-06-70-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;		Универсальная модель для женщин и мужчин, стелька, верхняя часть подкладка выполнены из кожи, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам.	Прочность на разрыв верха: 92 Н (±15%) Прочность крепления верха с подошвой: 4,0 Н/мм Устойчивость к многократному изгибу верха: более 50 000 циклов без растрескивания лицевой части Устойчивость к многократному изгибу подошвы (увеличение разреза): 0,5 мм Особые эргономические свойства: Использованные материалы являются мягкими, эластичными и адаптируются форме ступни, они легкие и не стесняют движения, а конструкция подошвы сформирована анатомически, и таким образом поглощает энергию пятки (амортизатор). Ношением этой обуви потребитель облегчает нагрузку на позвоночник и суставы и одновременно улучшает циркуляцию крови. Ощущение легкости и комфорта оказывает положительное влияние на общее психофизическое состояние. Устойчивость к скольжению на поверхности из керамической плитки с NaLS (коэффициент трения): скольжение на пятке		

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики																																																																				
33	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка меховая PU-06-80-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;		Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	подошвы - не менее 0,33; скольжение по всех поверхности подошвы – не менее 0,32 Толщина подошвы, не менее: 15 мм в части перегиба пальцев и не менее 22 мм в пяточной части. Высота задников: 63 мм Остаточная деформация задника – не более 1 мм.																																																																				
			Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть выполнена из кожи, стелька и подкладка - из овчинного меха подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Длина стопы, см</th><th>Ширина стопы, см</th><th>Полнота, см</th><th>Высота обуви, не менее, см</th><th>Масса полупары PU-06-70-КК (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>37</td><td>24,0</td><td>8,50</td><td>22,0</td><td>5,9</td><td>185</td></tr><tr><td>38</td><td>24,6</td><td>8,75</td><td>22,4</td><td>6,0</td><td>190</td></tr><tr><td>39</td><td>25,3</td><td>9,00</td><td>22,8</td><td>6,1</td><td>195</td></tr><tr><td>40</td><td>26,0</td><td>9,25</td><td>23,2</td><td>6,2</td><td>200</td></tr><tr><td>41</td><td>26,6</td><td>9,50</td><td>23,6</td><td>6,3</td><td>205</td></tr><tr><td>42</td><td>27,3</td><td>9,75</td><td>24,0</td><td>6,4</td><td>210</td></tr><tr><td>43</td><td>28,0</td><td>10,00</td><td>24,4</td><td>6,5</td><td>215</td></tr><tr><td>44</td><td>28,6</td><td>10,25</td><td>24,8</td><td>6,6</td><td>220</td></tr><tr><td>45</td><td>29,3</td><td>10,50</td><td>25,2</td><td>6,7</td><td>225</td></tr><tr><td>46</td><td>30,0</td><td>10,75</td><td>25,6</td><td>6,8</td><td>229</td></tr></table>						Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары PU-06-70-КК (эталона), г (±10%)	37	24,0	8,50	22,0	5,9	185	38	24,6	8,75	22,4	6,0	190	39	25,3	9,00	22,8	6,1	195	40	26,0	9,25	23,2	6,2	200	41	26,6	9,50	23,6	6,3	205	42	27,3	9,75	24,0	6,4	210	43	28,0	10,00	24,4	6,5	215	44	28,6	10,25	24,8	6,6	220	45	29,3	10,50	25,2	6,7	225	46	30,0	10,75
Размер (типоразмерный ряд)	Длина стопы, см	Ширина стопы, см	Полнота, см	Высота обуви, не менее, см	Масса полупары PU-06-70-КК (эталона), г (±10%)																																																																			
37	24,0	8,50	22,0	5,9	185																																																																			
38	24,6	8,75	22,4	6,0	190																																																																			
39	25,3	9,00	22,8	6,1	195																																																																			
40	26,0	9,25	23,2	6,2	200																																																																			
41	26,6	9,50	23,6	6,3	205																																																																			
42	27,3	9,75	24,0	6,4	210																																																																			
43	28,0	10,00	24,4	6,5	215																																																																			
44	28,6	10,25	24,8	6,6	220																																																																			
45	29,3	10,50	25,2	6,7	225																																																																			
46	30,0	10,75	25,6	6,8	229																																																																			
34	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка текстильная PU-06-90-КК, женские/мужские, размер: 37-46 с		Универсальная модель для женщин и мужчин, верхняя часть и стелька выполнена из кожи, подкладка из текстиля, подошва – из полиуретана. Имеется текстильная застежка-липучка для	<table><tr><th>Размер (типоразмерный ряд)</th><th>Масса полупары PU-06-80-КК (эталона), г (±10%)</th><th>Масса полупары PU-06-90-КК (эталона), г (±10%)</th></tr><tr><td>37</td><td>150</td><td>165</td></tr><tr><td>38</td><td>155</td><td>170</td></tr><tr><td>39</td><td>160</td><td>180</td></tr><tr><td>40</td><td>160</td><td>180</td></tr><tr><td>41</td><td>165</td><td>185</td></tr><tr><td>42</td><td>165</td><td>185</td></tr><tr><td>43</td><td>170</td><td>190</td></tr><tr><td>44</td><td>170</td><td>190</td></tr><tr><td>45</td><td>175</td><td>195</td></tr><tr><td>46</td><td>180</td><td>200</td></tr></table>						Размер (типоразмерный ряд)	Масса полупары PU-06-80-КК (эталона), г (±10%)	Масса полупары PU-06-90-КК (эталона), г (±10%)	37	150	165	38	155	170	39	160	180	40	160	180	41	165	185	42	165	185	43	170	190	44	170	190	45	175	195	46	180	200																														
Размер (типоразмерный ряд)	Масса полупары PU-06-80-КК (эталона), г (±10%)	Масса полупары PU-06-90-КК (эталона), г (±10%)																																																																						
37	150	165																																																																						
38	155	170																																																																						
39	160	180																																																																						
40	160	180																																																																						
41	165	185																																																																						
42	165	185																																																																						
43	170	190																																																																						
44	170	190																																																																						
45	175	195																																																																						
46	180	200																																																																						

№ п/п	Вариант исполнения	Внешний вид	Описание	Технические характеристики
	шагом 1, цвет: коричневый/синий.		регулировки полноты ноги. Модель дополнительно изготавливается по индивидуальным меркам. Цветовые варианты исполнений: коричневый, синий	

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

13.1 Комплект поставки медицинского изделия

Обувь поставляется в следующем виде:

- Обувь ортопедическая малосложная «DrLuigi®», в вариантах исполнения - 1 шт. (1 пара)
- Инструкция по применению – 1 шт.

13.2 Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека).

Изделие кратковременного контакта (менее 24 ч) с неповрежденной кожей

Информация о материалах, из которых изготовлено медицинское изделие, вступающих в контакт с организмом человека (пациента) представлен в таблице ниже:

Таблица 2 - Информация о материалах, из которых изготовлено медицинское изделие.

№ п/п	Наименование варианта исполнения	Материал, из которого изготовлено медицинское изделие
1.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шнурой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: коричневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: коричневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: коричневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: коричневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: коричневый;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль коричневого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль коричневого цвета, 100% хлопок Подолшва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
2.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: розовый;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль розового цвета, 100% хлопок

	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: розовый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: розовый;	Лента для окантовки – текстиль розового цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цветов)
3.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: сиреневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: сиреневый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: сиреневый;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль сиреневого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль сиреневого цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель сиреневого цвета
4.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: малиновый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: малиновый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: малиновый;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль малинового цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль малинового цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель малинового цвета
5.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: красный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: красный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: красный;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль красного цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль красного цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель красного цвета

	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки детские PU-04-04-TP, размеры 22-34, цвет: красный;	
6.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: голубой; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шнуркой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: голубой; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: голубой;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль голубого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль голубого цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель голубого цвета
7.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шнуркой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: синий; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки детские PU-04-04-TP, размеры 22-34, цвет: синий;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль синего цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль синего цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
8.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: зеленый;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль зеленого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль зеленого цвета, 100% хлопок

	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: зеленый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: зеленый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: зеленый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: зеленый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: зеленый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: зеленый;	Подошва – полиуретановая масса Краситель зеленого цвета
9.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: серый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: серый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: серый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: серый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: серый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: серый; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль серого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль серого цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель серого цвета

	"BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: серый;	
10.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: черный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: черный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, женские/мужские, цвет: черный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, женские/мужские, цвет: черный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, женские/мужские, цвет: черный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, женские/мужские, цвет: черный; Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: черный;	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль черного цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль черного цвета, 100% хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель черного цвета
11.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер 47, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер 48, женские/мужские, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер 49, женские/мужские, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер 50, женские/мужские, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета

	шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03- 01-KS, женские/мужские, размер: 38- 46 с шагом 1, цвет: коричневый	
12.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: розовый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: розовый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03- 01-KS, женские/мужские, размер: 38- 46 с шагом 1, цвет: розовый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель розового цвета (достигается смешением цветов красного и белого) Подошва – полиуретановая масса Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цветов)
13.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: сиреневый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: сиреневый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03- 01-KS, женские/мужские, размер: 38- 46 с шагом 1, цвет: сиреневый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель сиреневого цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель сиреневого цвета
14.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: малиновый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: малиновый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03- 01-KS, женские/мужские, размер: 38- 46 с шагом 1, цвет: малиновый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель малинового цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель малинового цвета
15.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: красный	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель красного цвета

	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: красный Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: красный	Подошва – полиуретановая масса Краситель красного цвета
16.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: синий	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель синего цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
17.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: зеленый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: зеленый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: зеленый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: зеленый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель зеленого цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель зеленого цвета

	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: зеленый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: зеленый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: зеленый	
18.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: серый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: серый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: серый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: серый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: серый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: серый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: серый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель серого цвета (достигается смешиванием черного и белого цвета) Подошва – полиуретановая масса Краситель серого цвета
19.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: черный Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: черный Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: черный	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель черного цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель черного цвета

	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: черный Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: черный Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: черный Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: черный Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: черный	
20.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: белый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель белого цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель белого цвета

21.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: бежевый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель бежевого цвета Подошва – полиуретановая масса Краситель бежевого цвета
22.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: черный	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель черного цвета Металлическая застежка черного цвета – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель черного цвета
23.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель белого цвета Металлическая застежка белого цвета – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель белого цвета
24.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: бежевый	Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель бежевого цвета

			Металлическая застежка бежевого цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель бежевого цвета
25.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: коричневый		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Металлическая застежка коричневого цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
26.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: сиреневый		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель сиреневого цвета Металлическая застежка сиреневого цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель сиреневого цвета
27.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: малиновый		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель малинового цвета Металлическая застежка малинового цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель малинового цвета
28.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: синий		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель синего цвета Металлическая застежка синего цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
29.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: зеленый		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель зеленого цвета Металлическая застежка зеленого цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель зеленого цвета
30.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: розовый		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель розового цвета (достигается смешением цветов красного и белого) Металлическая застежка розового цвета – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса

			Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цветов)
31.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалин кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: красный		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель красного цвета Металлическая застежка красного цвета – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель красного цвета
32.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалин кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: серый		Верхняя часть, стелька и подкладка, лента для окантовки – натуральная кожа Краситель серого цвета (достигается смешиванием черного и белого цвета) Металлическая застежка серого цвета – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель серого цвета
33.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель белого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель белого цвета
34.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: бежевый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель бежевого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель бежевого цвета
35.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: коричневый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа производства Краситель коричневого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
36.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: розовый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель розового цвета (достигается смешением цветов красного и белого) Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO

			Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цвета)
37.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: сиреневый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель сиреневого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель сиреневого цвета
38.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: малиновый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель малинового цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель малинового цвета
39.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: красный		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель красного цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель красного цвета
40.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: синий		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель синего цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
41.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: зеленый		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель зеленого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь Подощва – полиуретановая масса Краситель зеленого цвета
42.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с		Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель черного цвета

	липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: черный	Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Металлическое кольцо – нержавеющая сталь производства Подошва – полиуретановая масса Краситель черного цвета
43.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: белый	Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель белого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель белого цвета
44.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: бежевый Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка кожаная PU-06-10-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: бежевый	Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель бежевого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель бежевого цвета
45.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка кожаная PU-06-70-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый	Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
46.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: черный	Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель черного цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель черного цвета
47.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка кожаная PU-06-10-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка кожаная PU-06-70-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий	Вверх, стелька, подкладка – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
48.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: черный	Верхняя часть, стелька и подкладка – натуральная кожа Краситель черного цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса

		Краситель черного цвета
49.	Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные с цветочками PU- 02-61-KS, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый	Верхняя часть – натуральная кожа производства Краситель белого цвета Фурнитура – цветочки из натуральной кожи Красители красного цвета Белого цвета Зеленого цвета Голубого цвета (достигается смешением синего цвета и белого) Малинового цвета Желтого цвета (достигается смешением оранжевого цвета) и белого) Подощва – полиуретановая масса Краситель белого цвета
50.	Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные с цветочками PU- 02-61-KS, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: малиновый	Верхняя часть – натуральная кожа Краситель малинового цвета Фурнитура – цветочки из натуральной кожи Белого цвета Зеленого цвета Голубого цвета смешением синего цвета и белого Малинового цвета Желтого цвета (достигается смешением оранжевого цвета и белого) Подощва – полиуретановая масса Краситель малинового цвета
51.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы текстильные летние PU- 02-80-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий	Верхняя часть, стелька, лента для окантовки – махровый текстиль 1 синего цвета, 100% хлопок Фурнитура – текстиль синего и белого цвета, 100% хлопок Подощва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
52.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22- 34 с шагом 1, цвет: розовый	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль розового цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль розового цвета 100% хлопок Текстильная резинка – текстиль розового цвета Подощва – полиуретановая масса Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цветов)
53.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22- 34 с шагом 1, цвет: красный	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль красного цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль красного цвета, 100% хлопок

		Резинка – текстиль красного цвета Подощва – полиуретановая масса Краситель красного цвета
54.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22- 34 с шагом 1, цвет: голубой	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль голубого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль голубого цвета, 100% хлопок Резинка – текстиль голубого цвета Подощва – полиуретановая масса Краситель голубого цвета
55.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22- 34 с шагом 1, цвет: синий	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль синего цвета, 100% хлопок производства SIRETESILLE s.r.l., Италия Лента для окантовки – текстиль синего цвета, 100% хлопок Резинка – текстиль синего цвета Подощва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
56.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль розового цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль розового цвета, 100% хлопок Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подощва – полиуретановая масса Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цветов)
57.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: красный	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль красного цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль красного цвета, 100% хлопок Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подощва – полиуретановая масса Краситель красного цвета
58.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: голубой	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль голубого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль голубого цвета, 100% хлопок Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подощва – полиуретановая масса Краситель голубого цвета
59.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: синий	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль синего цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль синего цвета, 100% хлопок

		Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подойма – полиуретановая масса Краситель синего цвета
60.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль розового цвета, 100% хлопок Текстильная застежка-молния – нейлон VELCRO Лента для окантовки – текстиль розового цвета, 100% хлопок Подойма – полиуретановая масса Краситель розового цвета (достигается смешением красного и белого цветов)
61.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: красный	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль красного цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль красного цвета, 100% хлопок Текстильная застежка- молния – нейлон VELCRO Подойма – полиуретановая масса Краситель красного цвета
62.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: голубой	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль голубого цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль голубого цвета, 100% хлопок Текстильная застежка- молния – нейлон VELCRO Подойма – полиуретановая масса Краситель голубого цвета
63.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: синий	Верхняя часть, стелька и подкладка – махровый текстиль синего цвета, 100% хлопок Лента для окантовки – текстиль синего цвета, 100% хлопок Текстильная застежка- молния – нейлон VELCRO Подойма – полиуретановая масса Краситель синего цвета
64.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка текстильная PU-06-30-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка текстильная PU-06-90-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый	Вверх, стелька, подкладка – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Подкладка – текстиль 100% хлопок коричневого цвета Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подойма – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
65.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка	Вверх, стелька – натуральная кожа Краситель синего цвета

	текстильная PU-06-30-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка текстильная PU-06-90-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий	Подкладка – текстиль синего цвета, 100% хлопок Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
66.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка меховая PU-06-20-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка меховая PU-06-80-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый	Вверх, стелька, подкладка – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Подкладка – овчинный мех Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
67.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка меховая PU-06-20-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка меховая PU-06-80-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий	Вверх, стелька – натуральная кожа Краситель синего цвета Подкладка – овчинный мех Текстильная застежка-липучка – нейлон VELCRO Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
68.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка кожаная PU-06-40-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый	Вверх, стелька, подкладка – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Шнурки – хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
69.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка кожаная PU-06-40-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке, подкладка кожаная PU-06-01-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий	Верхняя часть, стелька, подкладка – натуральная кожа Краситель синего цвета Шнурки – хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
70.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка меховая PU-06-50-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый	Вверх, стелька – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Подкладка – овчинный мех Шнурки – хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
71.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями,	Вверх, стелька – натуральная кожа Краситель синего цвета

	подкладка меховая PU-06-50-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий	Подкладка – овчинный мех Шнурки – хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета
72.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка текстильная PU-06-60-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый	Вверх, стелька – натуральная кожа Краситель коричневого цвета Подкладка – текстиль коричневого цвета, 100% хлопок Шнурки – хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель коричневого цвета
73.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка текстильная PU-06-60-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий	Вверх, стелька – натуральная кожа Краситель синего цвета Подкладка – текстиль коричневого цвета, 100% хлопок Шнурки – хлопок Подошва – полиуретановая масса Краситель синего цвета

13.3 Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения

Варианты исполнения медицинского изделия:

1. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
2. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
3. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
4. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
5. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
6. Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пятточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
7. Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ серый/ черный;
8. Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;
9. Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ черный;
10. Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;
11. Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные с цветочками PU-02-61-KS, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый / малиновый;
12. Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/

- сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;
13. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке, подкладка кожаная PU-06-01-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий;
 14. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка кожаная PU-06-10-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 15. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка меховая PU-06-20-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 16. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка текстильная PU-06-30-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 17. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка кожаная PU-06-40-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 18. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка меховая PU-06-50-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 19. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка текстильная PU-06-60-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 20. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка кожаная PU-06-70-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 21. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка меховая PU-06-80-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;
 22. Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка текстильная PU-06-90-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий.

содержат материалы животного происхождения, а именно натуральную свиную кожу.

Изделие не содержит материалы человеческого происхождения.

13.4 Сведения о документах, подтверждающих качество лекарственного препарата, фармацевтической субстанции, биологического материала и иного вещества.

Изделие не содержит лекарственных средств.

14 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

14.1 Сведения о маркировке изделия

Каждая полупара обуви замаркирована с указанием:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- размер.

На каждую пару прикреплен вкладыш со следующей информацией:

- товарный знак, адрес, контактная информация и страна предприятия-изготовителя;
- показания;
- информация о материале верхней части, подкладки, подошвы
- рекомендации по уходу за обувью;
- информация, носящая рекламный характер.

Также к полупаре обуви прикрепляется этикетка с рекламной информацией.

И этикетка с артикулом обуви и размером.

Также на каждую пару прикрепляется этикетка со следующей информацией:

- Наименование торгового бренда;
- Наименование, адрес и контактные данные изготовителя;
- Наименование, адрес и контактные данные уполномоченного представителя на территории РФ;
- Наименование медицинского изделия и варианта исполнения;
- Номер и дата регистрационного удостоверения;
- Размер;
- Полнота;
- Цвет;
- Материалы подошвы и подкладки;

- Штрих код;
- Цифровая маркировка «Честный знак» Data-matrix;
- символ «Изготовитель»;
- символ «Код партии»;
- символ «Номер по каталогу»;
- символ «Дата производства»;
- символ «Температурный диапазон»;
- символ «Диапазон влажности»;
- символ «Ограничение по атмосферному давлению»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Рекомендовано стирать изделие до 40 °С» (для изделий изготовленных из хлопка);
- информация о материале: хлопок 100% или натуральная кожа и соответствующий символ;
- символ «Беречь от воздействия солнечного света».
- символ «Противодействует скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям (керамика и сталь)»

14.2 Сведения о потребительской упаковке и маркировке

Изделие поставляется в прозрачной упаковке из полиэтилена 300 мкм, в количестве 1 пара/уп.

Габаритные размеры потребительской упаковки, мм ($\pm 10\%$): 270 x 380

Масса нетто, г ($\pm 10\%$): 7

На маркировке потребительской упаковке изделия нанесена следующая информация:

- Наименование торгового бренда;
- Наименование, адрес и контактные данные изготовителя;
- Наименование, адрес и контактные данные уполномоченного представителя на территории РФ;
- Наименование медицинского изделия и варианта исполнения;
- Номер и дата регистрационного удостоверения;
- Размер;
- Полнота;
- Цвет;
- Материалы подошвы и подкладки;
- Штрих код;
- Цифровая маркировка «Честный знак» Data-matrix;
- символ «Изготовитель»;
- символ «Код партии»;
- символ «Номер по каталогу»;
- символ «Дата производства»;
- символ «Температурный диапазон»;
- символ «Диапазон влажности»;
- символ «Ограничение по атмосферному давлению»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Рекомендовано стирать изделие до 40 °С» (для изделий изготовленных из хлопка);
- информация о материале: хлопок 100% или натуральная кожа и соответствующий символ;
- символ «Беречь от воздействия солнечного света».
- символ «Противодействует скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям (керамика и сталь)»

14.3 Сведения о транспортной упаковке и маркировке

Транспортная упаковка - картонный короб Т23

Габаритные размеры, мм ($\pm 10\%$): 600 x 400 x 400

Масса нетто, г ($\pm 10\%$): 700

Количество пар обуви, помещающихся в транспортную упаковку, в зависимости от варианта исполнения представлены в таблице ниже.

Таблица 3 - Описание количества пар, помещающихся в транспортную упаковку в зависимости от варианта исполнения.

№ п/п	Наименование варианта исполнения	Количество, пар
1.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU-01-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	до 35
2.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние с пяточной шпорой PU-01T-01-TF, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	30
3.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU47-01-01-TF, женские/мужские, размер: 47, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
4.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU48-01-01-TF, женские/мужские, размер: 48, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
5.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU49-01-01-TF, женские/мужские, размер: 49, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
6.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки махровые домашние PU50-01-01-TF, женские/мужские, размер: 50, цвет: коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
7.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки закрытые махровые "BALEA" PU-01-02-TP, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ голубой/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	12
8.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU-01-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
9.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU47-01-11-KS, женские/мужские, размер: 47, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
10.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с	

	перфорацией PU48-01-11-KS, женские/мужские, размер: 48, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
11.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU49-01-11-KS, женские/мужские, размер: 49, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
12.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией PU50-01-11-KS, женские/мужские, размер: 50, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
13.	Обувь медицинская DrLuigi®, сабо кожаные с перфорацией с пяточной шпорой PU-01T-11-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	
14.	Обувь медицинская DrLuigi®, сандалии кожаные с двумя пряжками PU-02-01-KS, женские/мужские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ серый/ черный;	24
15.	Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные PU-02-02-KS, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;	30
16.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы женские кожаные с липучкой PU-02-20-KS, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный / синий/ зеленый/ черный;	24
17.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы мужские кожаные с липучкой PU-02-21-KS, размер: 39-46 с шагом 1, цвет: белый / бежевый/ коричневый/ черный;	12
18.	Обувь медицинская DrLuigi®, вьетнамки кожаные с цветочками PU-02-61-KS, женские, размер: 36-43 с шагом 1, цвет: белый / малиновый;	24
19.	Обувь медицинская DrLuigi®, шлепанцы текстильные летние PU-02-80-TP, женские/мужские, размер: 36-46 с шагом 1, цвет: синий;	
20.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки домашние кожаные PU-03-01-KS, женские/мужские, размер: 38-46 с шагом 1, цвет: белый/ бежевый/ коричневый/ розовый/ сиреневый/ малиновый/ красный/ синий/ зеленый/ серый/ черный;	12
21.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RAFAEL детские с резинками PU-04-01-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;	до 60

22.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIVAL детские с липучкой PU-04-02-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;	
23.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки RIKITA детские с молнией PU-04-03-TP, размер: 22-34 с шагом 1, цвет: розовый / красный / голубой / синий;	
24.	Обувь медицинская DrLuigi®, тапочки детские PU-04-04-TP, размеры 22-34, цвет: красный / синий;	
25.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке, подкладка кожаная PU-06-01-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: синий;	
26.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка кожаная PU-06-10-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
27.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка меховая PU-06-20-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
28.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на липучке, подкладка текстильная PU-06-30-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
29.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка кожаная PU-06-40-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
30.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка меховая PU-06-50-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
31.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки на шнуровке с петлями, подкладка текстильная PU-06-60-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
32.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка кожаная PU-06-70-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
33.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка меховая PU-06-80-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий;	
34.	Обувь медицинская DrLuigi®, полуботинки с четырьмя липучками, подкладка текстильная PU-06-90-KK, женские/мужские, размер: 37-46 с шагом 1, цвет: коричневый/синий.	

На маркировке транспортной упаковки изделия нанесена следующая информация:
 - Наименование торгового бренда;

- Наименование, адрес и контактные данные изготовителя;
- Наименование, адрес и контактные данные уполномоченного представителя на территории РФ;
- Наименование, адрес и контактные данные заказчика;
- Наименование медицинского изделия и варианта исполнения;
- Номер и дата регистрационного удостоверения;
- Цвет;
- Материалы подошвы и подкладки;
- Штрих код;
- QR-код (при наличии);
- символ «Изготовитель»;
- символ «Код партии»;
- символ «Номер по каталогу»;
- символ «Дата производства»;
- символ «Верх»
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Температурный диапазон»;
- символ «Диапазон влажности»;
- символ «Ограничение по атмосферному давлению»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Беречь от воздействия солнечного света».

15 ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Таблица 4 - Описание символов, присутствующие на маркировке медицинского изделия

Символ	Описание
	Товарный знак «DrLuigi ®»
	Изготовитель
	Код партии
	Номер по каталогу
	Дата производства
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Ограничение по атмосферному давлению
	Беречь от влаги
	Беречь от воздействия солнечного света
	Рекомендовано стирать изделие до 40 °C (для изделий изготовленных из хлопка)
	Хлопок 100%

	Противодействует скольжению по зажиренным и мокрым поверхностям (керамика и сталь)
	Натуральная кожа
	Верх

16 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Таблица 5 - Условия эксплуатации медицинского изделия

Характеристика	Значение
Температура, °C	от 0 до +35
Влажность, %	не более 80
Атмосферное давление, гПа	700 – 1060

Таблица 6 - Условия хранения медицинского изделия

Характеристика	Значение
Температура, °C	от +14 до +25
Влажность, %	50-80
Атмосферное давление, гПа	700 – 1060

Хранение обуви в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

Расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м.

Обувь и комплекты кроя должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ

Таблица 7 - Условия транспортировки медицинского изделия

Характеристика	Значение
Температура, °C	от -50 до +50
Влажность, %	не более 80
Атмосферное давление, гПа	700 – 1060

Транспортирование обуви и комплектов кроя должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании в условиях отрицательных температур требуется выдержка в течение 12 часов при комнатной температуре.

17 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Обувь должна использоваться строго по назначению и быть подобрана с учетом аттестации рабочих мест, фактического наличия вредных и опасных факторов на рабочих местах. Правильно подбирать обувь по размеру. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата. Рекомендуем покупать на размер больше, так как подошва приспосабливается к характеристикам стопы.

2. Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением, кожаная обувь не является непромокаемой (как например резиновая или из поливинилхлорида). Промокание обуви с верхом из натуральной кожи не является производственным дефектом.

3. Поскольку кожа является гидрофильным материалом. Кожаные модели медицинской обуви DrLuigi® не являются влагоустойчивыми (не обрабатываются специальным составом) то разрушение верхнего кожного слоя при контакте с влагой (вздутие, отслоение) не является производственным дефектом обуви и не является основанием для возврата

обуви продавцу. Все текстильные модели стираются в стиральных машинах при температуре до +40°C. После стирки обувь должна быть хорошо высушена перед тем как ее заново одевать.

4. При повышенной потливости ног или намокании, кожаные модели могут окраситься изнутри. Незначительный сход красителя со стельки и подкладки обуви, регламентируемый ГОСТ 940-81 не является дефектом производственного характера. Для предотвращения окрашивания стелек и подкладки перед началом носки необходимо воспользоваться специальными средствами по уходу за обувью.

5. Допустимое время непрерывного нахождения в обуви не ограничено.

6. Во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению профилактических свойств.

7. При надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться роштом для обуви во избежание заломов задника.

9. Перед вводом в эксплуатацию проверьте совпадают ли характеристики обуви с заказанным и нет ли на обуви трещин, изломов, деформаций, ненадежных соединений и креплений.

10. Соблюдайте правила по очистке и дезинфекции медицинского изделия.

18 ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ

Таблица 8 - Перечень международных стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Стандарт	Описание
ISO 13485	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN ISO 20347	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования
ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р 54407-2020	«Обувь ортопедическая. Общие технические условия»
ГОСТ 31209-2003	Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Часть 1. Общие требования биологической безопасности
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными

ГОСТ ISO 10993-5-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
ГОСТ ISO 10993-12-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
ГОСТ ISO 10993-23-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия
ГОСТ Р 57162-2016	Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией
ПНДФ 14.1.2:4.139-98	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии;
МУК 4.1.3166-14	«Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;
ГОСТ Р 55227-2012	Вода. Методы определения содержания формальдегида
Инструкция 880-71	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность

19 ДАННЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Обувь, которая утратив свои эксплуатационные качества после окончания срока службы, подлежит утилизации как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Обувь утилизируют на специализированных предприятиях по переработке отходов, а также вывозят на полигоны промышленных отходов или организованно обезвреживают в специально отведённых для этой цели местах.

20 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЧИСТКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

20.1 Очистка и дезинфекция

После окончания носки, обувь должна быть очищена от загрязнений сухой хлопчатобумажной тряпкой без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена

в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 30 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и про-сушки.

Не допускается чистить обувь органическими растворителями, такие как бензин, скипидар, уайт-спирит, ксилол, ацетон, на основе эфиров: метилизобутилкетон, циклогексанон, этилацетат, диоксан 1,4 метилацетат, на основе спиртов: этанол, метанол, бутанол.

При чистке кожаной обуви использовать сухую хлопчатобумажную тряпку.

При чистке обуви из хлпка использовать сухую хлопчатобумажную тряпку или сухую щетку.

Обувь из текстиля должна систематически, не реже одного раза в неделю стираться в стиральной машине при температуре до +40°C. После стирки обувь должна быть хорошо высушена.

Внимание: Используйте стиральный порошок на который у вас нет аллергической реакции.

20.2 Стерилизация

Не применимо.

21 СРОК СЛУЖБЫ/ГОДНОСТИ

Срок службы обуви при правильном использовании составляет 2 (два) года и зависит от интенсивности эксплуатации.

22 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обувь и специальные детали ортопедической обуви ремонту не подлежат.

23 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления обуви.

Гарантийный срок носки обуви: 30 дней с момента получения потребителем при соблюдении требований настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантия распространяется на изделия при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении транспортировки, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия строго по назначению и отсутствию видимых повреждений конкретного физического воздействия на обувь.

Порча медицинской обуви из-за неправильного выбора размера, неправильного и несвоевременного ухода не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

Размер обуви указан на подошве.

24 РЕКЛАМАЦИИ

По всем вопросам, связанным с качеством обуви, обращаться по следующему адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «ДрЛунджи» (ООО «ДрЛунджи»)

Россия, 141196, Московская Область, г.о. Щёлково, д Богослово, пр-д

Промышленный, владение 12, помещение 1,10,11

8 (926)596 76 53

adriy93@mail.ru

Ja, javni bilježnik ANTE ZLOKIĆ, Split, Velikotoka 26,
potvrđujem da je stranka

INGA VELIĆ, OIB 30042332000, SPLIT, ILKOČKA 19, kao zakonski zastupnik DR LUIGI d.o.o.,
MBS 000181353, OIB 24000042002, Split, Ulica blaženog Ivana Merza 8, u mojoj nazočnosti
priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena
utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 117309841 PU Splitko-dalmatinska, ovlaštenje za
zastupanje utvrđeno je utvrdom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-6487/2024

Split, 23.10.2024.



Javni bilježnik
ANTE ZLOKIĆ

На бланке компании «ДрЛуиджи»

Черная прямоугольная печать: ДрЛуиджи, производство и торговля, д.о.о. (DrLuigi d.o.o.), Сплит

-1-

Я, нотариус АНТЕ ЗЛОКИЧ (ANTE ZLOKIĆ), г. Сплит, Велебицка 26 (Split, Velebitska 26), подтверждаю, что сторона:
ИНГА ВЕЛИЧ (INGA VRLIĆ), Постоянный национальный идентификационный номер (OIB) 38642322038, СПЛИТ, ИЛОЧКА 19 (SPLIT, ИЛОЧКА 19), как законный представитель ДР ЛУИДЖИ, производство и торговля, д.о.о. (DR LUIGI d.o.o.), Уникальный основной гражданский номер (MBS) 060181253, Постоянный национальный идентификационный номер (OIB) 54635062082, Сплит, Улица Блаженного Ивана Мерца 8 (Split, Ulica blaženog Ivana Merza 8), в моем присутствии подтверждает подлинность личной подписи. Подпись на письме соответствует действительности. Личность заявителя установлена на основании удостоверения личности № 117209841 ПУ Сплитско-Далматинская, полномочия на представительство были определены путем проверки судебного реестра в электронном виде в этот день.
Нотариальный сбор за завершение по номеру 11. п. 4. ЗЈР взимается в размере 1,33 евро.
Нотариальное решение согласно ст. 19. п. 1. РРЈТ начисляется в размере 3,99 евро, к нему добавляется НДС в размере 1,00 евро.
Номер: OV-6407/2024
Сплит, 23.10.2024.
Нотариус АНТЕ ЗЛОКИЧ (ANTE ZLOKIĆ)
Личная подпись

Круглая синяя печать: Республика Хорватия, Сплит 1, Нотариус АНТЕ ЗЛОКИЧ (ANTE ZLOKIĆ)

-71-

Перевод данного текста выполнен переводчиком Князевой Виталиной Васильевной

Российская Федерация

Город Москва

Десятого декабря две тысячи двадцать четвертого года


Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Князевой Виталины Васильевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.


Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2024- 26-2739

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

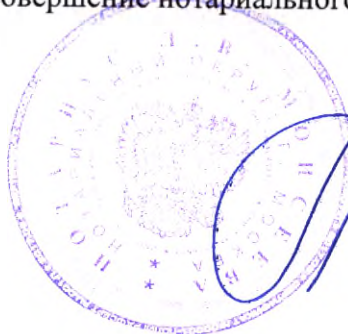

Л.В. Моисеева

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 72 лист(-а,-ов).

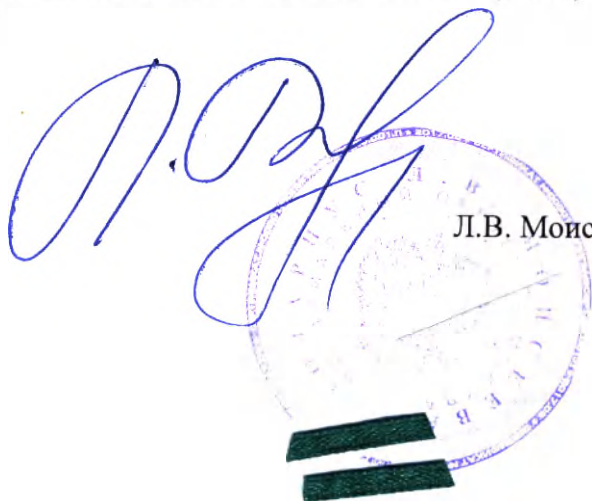

Л.В. Моисеева