

«Утверждаю»

Генеральный директор
ФГУП «ВИАТЕК»



А.В. Дёмшин

_____ 200__ г.

**Инструкция по применению
«Набор анатомического инструмента»**

Набор анатомического инструмента предназначен для всех необходимых манипуляций в процессе проведения патологоанатомических исследований в патологоанатомических и судебно-медицинских отделениях моргов.

Инструменты и принадлежности набора изготовлены из высокопрочной хромированной нержавеющей стали.

Форма инструментов разработана для максимально удобной работы.

Ваш инструмент прослужит долго:

Если вы будете регулярно следить за ним.

После каждого применения инструмента его необходимо вымыть и тщательно высушить.

Недопустимо оставление инструмента в воде на длительное время-это сократит срок службы инструмента.

Заточку режущего инструмента должен проводить специально обученный человек на специальном оборудовании для заточки ножей.

Для съема одноразовых лезвий с рукоятки необходимо использовать специальный съемник. Недопустимо снимать лезвие незащищенными руками.

Одноразовый инструмент после применения необходимо уничтожить согласно действующим директивам.

Упаковка обеспечивает защиту набора от внешних воздействий при транспортировании и при погрузочно-разгрузочных работах.

Эксклюзивный представитель в России ООО «Тантек» (495)5063818 office@tantec.ru www.tantec.ru

Набор должен храниться в сухом чистом помещении, при комнатной температуре, по возможности быть защищен от коррозий и воздействия ультрафиолетовых излучений.

Эксклюзивный представитель в России ООО «Тантек» (495)5063818 office@tantec.ru www.tantec.ru