



Утверждаю

Директор ООО «КМ-Проект»

А.П. Маврин

«12» марта 2024г.

Инструкция по использованию

«Пакет одноразового использования для сбора, хранения, термической обработки и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г», ТУ 9398-002-267614810-2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пакет одноразового использования для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов А, Б, В, Г (в дальнейшем - пакеты), предназначен для оснащения учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, с учетом классификации отходов ЛПУ по степени эпидемиологической и токсикологической опасности с целью сбора, хранения термической обработки и удаления медицинских отходов.

1.1 Пакеты ПМ-01-А (белый, черный цвет), ПМ-01-Б (желтый цвет), ПМ-01-В (красный цвет), ПМ-01-Г (черный цвет) предназначены для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г.

1.2 Пакеты ПМ-02-ТО-Б (желтый, прозрачный с желтой полосой) и ПМ-02-ТО-В (красный, прозрачный с красной полосой) предназначены для термической обработки в специализированных устройствах медицинских отходов классов Б, В с использованием электромагнитного излучения сверхвысокой частоты или автоклава.

1.3 Пакеты ПМ-03-ПА-Б (черный, синий цвет) предназначены для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пакет одноразового использования для сбора, хранения, термической обработки и удаления медицинских отходов классов А,Б,В,Г по ТУ 9398-002-267614810-2013.

Варианты исполнения:

1. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в составе:

1.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в количестве кратно 50;

1.2 бирка – при необходимости;

1.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку)

2. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в составе:

2.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм,

ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в количестве кратно 50;

2.2 бирка – при необходимости;

2.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

2.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку)

3. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в составе:

3.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в количестве кратно 50; 3.2 бирка – при необходимости;

3.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

3.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку)

4. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой не содержащей латекс), в составе:

4.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой не содержащей латекс), в количестве кратно 50;

4.2 бирка – при необходимости;

4.3 стяжка в количестве кратно 50-при необходимости.

4.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку)

5. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в составе:

5.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в количестве кратно 10(рулон);

5.2 бирка – при необходимости;

5.3 стяжка в количестве кратно 10-при необходимости;

5.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

6. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

6.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, белый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

6.2 бирка – при необходимости;

6.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

6.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

7. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом

5мм, ширина от 300мм до 1500мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в составе:

7.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в количестве кратно 50;

7.2 бирка – при необходимости;

7.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

8. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в составе:

8.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в количестве кратно 50;

8.2 бирка – при необходимости;

8.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

8.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

9. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в составе:

9.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в количестве кратно 50;

9.2 бирка – при необходимости;

9.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

9.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

10. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой не содержащей латекс), в составе:

10.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой не содержащей латекс), в количестве кратно 50;

10.2 бирка – при необходимости;

10.3 стяжка в количестве кратно 50-при необходимости.

10.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

11. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в составе:

11.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в количестве кратно 10(рулон);

11.2 бирка – при необходимости;

11.3 стяжка в количестве кратно 10-при необходимости;

11.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

12. ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

12.1 ПМ-01-А Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса А, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

12.2 бирка – при необходимости;

12.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

12.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

13. ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в составе:

13.1 ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в количестве кратно 50;

13.2 бирка – при необходимости;

13.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

14. ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в составе:

14.1 ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм. (ушками), в количестве кратно 50;

14.2 бирка – при необходимости;

14.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

14.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

15. ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в составе:

15.1 ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в количестве кратно 50;

15.2 бирка – при необходимости;

15.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

15.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

16. ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой не содержащей латекс), в составе:

16.1 ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм,

ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в количестве кратно 50;

16.2 бирка – при необходимости;

16.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

16.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

17. ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (лентой полиэтиленовой), в составе:

17.1 ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в количестве кратно 10 (рулон);

17.2 бирка – при необходимости;

17.3 стяжка в количестве кратно 10-при необходимости;

17.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

18. ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

18.1 ПМ-01-Б Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б, одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

18.2 бирка – при необходимости;

18.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

18.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

19. ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в составе:

19.1 ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм. (с ручками), в количестве кратно 50;

19.2 бирка – при необходимости;

19.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

20. ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в составе:

20.1 ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, красный, одноразовый, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм. (с ушками), в количестве кратно 50;

20.2 бирка – при необходимости;

20.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

20.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

21. ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом

5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в составе:

21.1 ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в количестве кратно 50;

21.2 бирка – при необходимости;

21.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

21.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

22. ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой не содержащей латекс), в составе:

22.1 ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой не содержащей латекс), в количестве кратно 50;

22.2 бирка – при необходимости;

22.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

22.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

23. ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в составе:

23.1 ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в количестве кратно 10(рулон);

23.2 бирка – при необходимости;

23.3 стяжка в количестве кратно 10- при необходимости;

23.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

24. ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

24.1 ПМ-01-В Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса В, одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

24.2 бирка – при необходимости;

24.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

24.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

25. ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в составе:

25.1 ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ручками), в количестве кратно 50;

25.2 бирка – при необходимости;

25.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

26. ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в составе:

26.1 ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с ушками), в количестве кратно 50;

26.2 бирка – при необходимости;

26.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости

26.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

27. ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в составе:

27.1 ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой латексной), в количестве кратно 50;

27.2 бирка – при необходимости;

27.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

27.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

28. ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой резиновой не содержащей латекс), в составе:

28.1 ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой не содержащей латекс), в количестве кратно 50;

28.2 бирка – при необходимости;

28.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

28.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку)

29. ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в составе:

29.1 ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (с лентой полиэтиленовой), в количестве кратно 10(рулон);

29.2 бирка – при необходимости;

29.3 стяжка в количестве кратно 10 – при необходимости;

29.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

30. ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

30.1 ПМ-01-Г Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Г, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013 высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

30.2 бирка – при необходимости;

30.3 стяжка, в количестве кратно 50- при необходимости;

30.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

31. ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой) в составе:

31.1 ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой) в количестве кратно 50;

31.2 бирка – при необходимости;

31.3 стяжка, в количестве кратно 50;

31.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

32. ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

32.1 ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, желтый, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5 мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

32.2 бирка – при необходимости;

32.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

32.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

33. ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, прозрачный с желтой полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, (со стяжкой) в составе:

33.1 ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, прозрачный с желтой полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой) в количестве кратно 50;

33.2 бирка – при необходимости;

33.3 стяжка, в количестве кратно 50;

33.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

34. ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, прозрачный с желтой полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

34.1 ПМ-02-ТО-Б Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов Б одноразовый, прозрачный с желтой полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

34.2 бирка – при необходимости;

34.3 стяжка в количестве кратно 50- при необходимости;

34.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

35. ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой), в составе:

35.1 ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой), в количестве кратно 50;

35.2 бирка – при необходимости;

35.3 стяжка в количестве кратно 50;

35.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

36. ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

36.1 ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

36.2 бирка – при необходимости;

36.3 стяжка, в количестве кратно 50- при необходимости;

36.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

37. ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, прозрачный с красной полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой), в составе:

37.1 ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, красный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм (со стяжкой), в количестве кратно 50;

37.2 бирка – при необходимости;

37.3 стяжка в количестве кратно 50;

37.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

38. ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, прозрачный с красной полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в составе:

38.1 ПМ-02-ТО-В Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов классов В одноразовый, прозрачный с красной полосой, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1500 мм с шагом 5мм, толщина от 9 мкм до 100 мкм с шагом 1мкм, в количестве кратно 50;

38.2 бирка – при необходимости;

38.3 стяжка, в количестве кратно 50- при необходимости

38.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

39. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками с окошком) на молнии, в составе:

39.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм,

ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками с окошком) на молнии, в количестве кратно 10;

39.2 бирка – при необходимости;

39.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

40. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками с окошком) с текстильной застежкой, в составе:

40.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с тканевыми ручками с окошком) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

40.2 бирка – при необходимости;

40.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

41. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками с окошком) с лентой контактной, в составе:

41.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с тканевыми ручками с окошками) с лентой контактной, в количестве кратно 10;

41.2 бирка – при необходимости;

41.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

42. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками без окошка) на молнии, в составе:

42.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками без окошка), на молнии, в количестве кратно 10;

42.2 бирка – при необходимости;

42.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

43. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками без окошка) с текстильной застежкой, в составе:

43.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками без окошка) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10.

43.2 бирка – при необходимости;

43.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

44. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками без окошка) с лентой контактной, в составе:

44.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм,

ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с тканевыми ручками без окошка), с лентой контактной, в количестве кратно 10;

44.2 бирка – при необходимости;

44.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

45. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками с окошком) на молнии, в составе:

45.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками с окошком) ,на молнии, в количестве кратно 10;

45.2 бирка – при необходимости;

45.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

46. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками с окошком) с текстильной застежкой, в составе:

46.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками с окошком) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

46.2 бирка – при необходимости;

46.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

47.ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками с окошком) с лентой контактной, в составе:

47.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с вырубными ручками с окошком), с лентой контактной, в количестве кратно 10;

47.2 бирка – при необходимости;

47.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

48.ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками без окошка) на молнии, в составе:

48.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками без окошка), на молнии, в количестве кратно 10;

48.2 бирка – при необходимости;

48.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

49. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками без окошка) с текстильной застежкой, в составе:

49.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм,

ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками без окошка) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

49.2 бирка – при необходимости;

49.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

50. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками без окошка) с лентой контактной, в составе:

50.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с вырубными ручками без окошка), с лентой контактной, в количестве кратно 10;

50.2 бирка – при необходимости;

50.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

51. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с окошком) на молнии в составе:

51.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), на молнии, в количестве кратно 10;

51.2 бирка – при необходимости;

51.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

52. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с окошком) с текстильной застежкой, в составе:

52.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

52.2 бирка – при необходимости;

52.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

53. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с окошком) с контактной лентой, в составе:

53.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), с контактной лентой, в количестве кратно 10;

53.2 бирка – при необходимости;

53.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

54. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (без окошка) на молнии, в составе:

54.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), на молнии, в количестве кратно 10;

54.2 бирка – при необходимости;

54.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

55. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (без окошка), с текстильной застежкой в составе:

55.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (без окошка), с текстильной застежкой в количестве кратно 10;

55.2 бирка – при необходимости;

55.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

56. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (без окошка) с контактной лентой, в составе:

56.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, черный, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (без окошка), с контактной лентой в количестве кратно 10;

56.2 бирка – при необходимости;

56.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

57. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками с окошком) на молнии, в составе:

57.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками с окошком) на молнии, в количестве кратно 10;

57.2 бирка – при необходимости;

57.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

58. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками с окошком) с текстильной застежкой, в составе:

58.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками с окошком) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

58.2 бирка – при необходимости;

58.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

59. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками с окошком) с лентой контактной, в составе:

59.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с тканевыми ручками с окошком) с лентой контактной, в количестве кратно 10;

59.2 бирка – при необходимости;

59.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

60. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками без окошка) на молнии, в составе:

60.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками без окошка), на молнии, в количестве кратно 10;

60.2 бирка – при необходимости;

60.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

61. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками без окошка) с текстильной застежкой, в составе:

61.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с тканевыми ручками без окошка) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10.

61.2 бирка – при необходимости;

61.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

62. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с тканевыми ручками без окошка) с лентой контактной, в составе:

62.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с тканевыми ручками без окошка), с лентой контактной, в количестве кратно 10;

62.2 бирка – при необходимости;

62.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

63. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками с окошком), на молнии, в составе:

63.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками с окошком), на молнии, в количестве кратно 10;

63.2 бирка – при необходимости;

63.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

64. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками с окошком), с текстильной застежкой, в составе:

64.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических с отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками окошком) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

64.2 бирка – при необходимости;

64.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

65.ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками с окошком), с лентой контактной, в составе:

65.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с вырубными ручками с окошком), с лентой контактной, в количестве кратно 10:

65.2 бирка – при необходимости;

65.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

66.ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками без окошка), на молнии, в составе:

66.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками без окошка), на молнии, в количестве кратно 10;

66.2 бирка – при необходимости;

66.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

67. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками без окошка) с текстильной застежкой, в составе:

67.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм (с вырубными ручками без окошка) с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

67.2 бирка – при необходимости;

67.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

68.ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с вырубными ручками без окошка) с лентой контактной, в составе:

68.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм, с шагом 5мм, (с вырубными ручками без окошка), с лентой контактной, в количестве кратно 10;

68.2 бирка – при необходимости;

68.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

69.ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с окошком) на молнии в составе:

69.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), на молнии в количестве кратно 10;

69.2 бирка – при необходимости;

69.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

70. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с окошком) с текстильной застежкой, в составе:

70.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), с текстильной застежкой, в количестве кратно 10;

70.2 бирка – при необходимости;

70.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

71. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (с окошком) с контактной лентой, в составе:

71.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), с контактной лентой, в количестве кратно 10;

71.2 бирка – при необходимости;

71.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

72. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (без окошка) на молнии, в составе:

72.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (с окошком), на молнии, в количестве кратно 10;

72.2 бирка – при необходимости;

72.3 бирка – при необходимости;

72.4 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку)

73. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (без окошка), с текстильной застежкой в составе:

73.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (без окошка), с текстильной застежкой в количестве кратно 10;

73.2 бирка – при необходимости;

73.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

74. ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, толщина от 40 мкм до 200 мкм с шагом 1мкм (без окошка) с контактной лентой, в составе:

74.1 ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый, синий, по ТУ 9398-002-267614810-2013, высота от 300мм до 2200мм с шагом 5мм, ширина от 300мм до 1000 мм с шагом 5мм, (без окошка), с контактной лентой в количестве кратно 10;

74.2 бирка – при необходимости;

74.3 инструкция по эксплуатации -1 шт. (на групповую /транспортную упаковку).

2.2. Основные технические требования:

2.2.1. Цвет и маркировка пакетов должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, СанПиН 2.1.3684-21 и образцу-этalonу.

2.2.2. Пакеты должны иметь сплошную ровную, гладкую поверхность без запрессованных складок, разрывов и посторонних включений.

2.2.3. Сварной шов пакетов ПМ-01-А, ПМ-01-Б, ПМ-01-В, ПМ-01-Г, ПМ-02-ТО-Б, ПМ-02-ТО-В должен быть герметичным, равномерным по всему контуру, без прожженных мест.

2.2.4. Ширина сварного шва пакетов ПМ-01-А, ПМ-01-Б, ПМ-01-В, ПМ-01-Г, ПМ-02-ТО-Б, ПМ-02-ТО-В и машинного шва пакета ПМ-03-ПА-Б не должна превышать 18 мм. Швы должны располагаться на расстоянии до 10 мм от края пакета. При необходимости в зависимости от вида материала, из которого изготавливаются изделия, а также свойств упаковываемых медицинских отходов, швы могут располагаться от края пакета более чем на 10мм.

2.2.5. Заполненные медицинскими отходами и герметично закрытые пакеты должны быть устойчивы к разрывам при падении.

2.2.6 Пакеты должны быть устойчивы при эксплуатации, хранении и транспортировании к воздействию температуры окружающей среды от -25°C до +40°C, относительной влажности 100% при температуре +25°C.

2.2.7 Пакеты ПМ-02-ТО-Б, ПМ-02-ТО-В должны быть устойчивы к электромагнитному излучению сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 60 минут, при температуре 100°C.

2.2.8 Пакеты ПМ-02-ТО-Б, ПМ-02-ТО-В должны быть устойчивы к паровой стерилизации в течение 20 минут, при температуре 132 градуса Цельсия и давлении в камере 2 атмосферы.

2.3 Комплектность:

В комплект поставки должны входить:

- пакеты одного размера и одного назначения с указанием их количества (кратно 50или 10) и обозначения (класс опасности) в сопроводительном документе;
- средства герметизации пакетов в количестве кратном 50 ,10 в зависимости от использованной технологии производства (при необходимости);
- бирка – при необходимости.
- инструкция по эксплуатации -1 шт (на групповую /транспортную упаковку)

*В случае отсутствия бирки информация по СанПиН 2.1.3684-21 наносится непосредственно.

Общий вид пакетов приведён на рисунках Приложения А.

3. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Требования к персоналу, эксплуатирующему изделия

К использованию пакетов допускается только персонал, ознакомленный с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

на пакет.

3.2. Показания к применению

Пакеты предназначены для оснащения учреждений здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 с учетом классификации отходов ЛПУ по степени эпидемиологической и токсикологической опасности с целью сбора, хранения термической обработки и удаления медицинских отходов.

3.3. Противопоказания

Противопоказания отсутствуют.

Применять с осторожностью людям, имеющим индивидуальную непереносимость и аллергические реакции на материалы пакетов

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Пакеты для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г: ПМ-01-А , ПМ-01-Б, ПМ-01-В, ПМ-01-Г.

4.1.1 Порядок работы на местах сбора медицинских отходов

- а) Достаньте из упаковки пакет, соответствующий количеству и классу опасности отходов, для которых он будет использоваться.

- б) Расправьте пакет и раскройте его по горловине.
- с) Руками придайте ему округлую форму.
- д) Вставьте его в подходящую по размеру тару (бак или контейнер) или закрепите на стойке-тележке фиксаторами.
- е) Для фиксации пакета на баке, загните его края по краю тары.
- ф) Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
- г) Заполните пакет на $\frac{3}{4}$ отходами соответствующего класса опасности. Следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментарий.
- х) Соберите края пакета и выпустите из него воздух.
- и) Перекрутите горловину пакета, промаркируйте и герметизируйте пакет замком-стяжкой, лентой резиновой латексной, лентой резиновой не содержащей латекс, лентой полиэтиленовой, допускается завязывать ручки пакета или ушки.
- ж) Пакет готов к транспортировке с места образования отходов на место временного хранения отходов на территории ЛПУ.

4.2 Пакеты для термической обработки медицинских отходов классов Б, В ПМ-02-ТО-Б и ПМ-02-ТО-В.

4.2.1 Порядок работы на местах сбора медицинских отходов:

- а) Достаньте из упаковки пакет, соответствующий количеству и классу опасности отходов, для которых он будет использоваться.
- б) Расправьте пакет и раскройте его по горловине.
- с) Руками придайте ему округлую форму.
- д) Вставьте его в подходящую по размеру тару (бак или контейнер).
- е) Для фиксации пакета на баке, загните его края по краю тары.
- ф) Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
- г) Предварительно собранные в пакеты соответствующих классов опасности Б или В, медицинские отходы увлажняют, 200-300 мл) и транспортируют на место проведения обеззараживания, где помещаются в подготовленные пакеты ПМ-02-ТО-Б или ПМ-02-ТО-В для проведения процесса обеззараживания путем термообработки в соответствующем оборудовании.

Внимание: следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментарий и металлосодержащие изделия

- х) Поверх уложенных пакетов с медотходами вылейте равномерно, орошая их $1,3 \pm 0,1$ л воды. Прикрепите на внутреннюю поверхность пакета в верхней его части с двух противолежащих от центра бака сторон индикаторы «Фарма-тест-Винар» 110/10.
- и) Соберите края пакета таким образом, чтобы оставшийся в нем воздушный пузырь был минимальным.
- ж) Не завязывая и не уплотняя пакет, соберите отогнутую верхнюю часть пакета и прикройте его.
- з) Закройте тару крышкой и зафиксируйте ее тремя фиксаторами (из четырех находящихся на них).
- и) Пакет в таре (баке или контейнере) готов к обеззараживанию в СВЧ-установке.

4.2.2 Порядок работы на месте обеззараживания медицинских отходов:

- а) Разместите тару (бак или контейнер) с пакетом в СВЧ-установке.
- б) Выставьте режим работы СВЧ-установки согласно рекомендациям производителя
- с) Выгрузите тару (бак или контейнер) с пакетом не ранее чем через 5 мин после звукового сигнала, свидетельствующего об окончании процесса обеззараживания отходов.
- д) Откройте крышку тары (бака или контейнера) и расправьте края пакета.
- е) Достаньте из пакета индикатор «Фарма-тест-Винар» 110/10, изменивший цвет на эталонный, и вклейте в журнал регистрации режимов обеззараживания отходов.
- ф) Завяжите или загерметизируйте стяжкой пакет с обеззараженными отходами и выньте из тары (бака или контейнера).
- г) Пакет готов к транспортировке на место временного хранения отходов на территории ЛПУ.

4.2.3 Порядок работы при термической обработке методом паровой стерилизации (автоклавирование)

- а) Разместите тару (бак или контейнер) с пакетом в стерилизаторе паровом.
- б) Выставьте режим работы стерилизатора
- с) Выгрузите тару (бак или контейнер) с пакетом после окончания обеззараживания отходов.
- д) Откройте крышку тары (бака или контейнера) и расправьте края пакета.
- е) Достаньте из пакета индикатор «Фарма-тест-Винар» соответствующий режиму обеззараживания и изменивший цвет на эталонный, и вклейте в журнал регистрации режимов обеззараживания отходов.
- ф) Завяжите пакет с обеззараженными отходами и выньте из тары (бака или контейнера).
- г) Пакет готов к транспортировке на место временного хранения отходов на территории ЛПУ.

4.3 Пакет для патологоанатомических отходов ПМ-03-ПА-Б

4.3.1 Порядок работы на местах сбора медицинских отходов для их последующей утилизации

- a) Достаньте из упаковки пакет.
- b) Расправьте пакет
- c) Расстегните застежку полностью
- d) Поместите патологоанатомические отходы в пакет.
- e) Закрепите идентификационные бирки на патологоанатомических отходах.
- f) Закройте пакет.
- g) Пакет готов к транспортировке.

4.3.2 Порядок работы на местах сбора медицинских отходов для временного хранения тел

- a) Достаньте из упаковки пакет.
- b) Расправьте пакет
- c) Разместите его на средстве транспортирования (носилки, каталка)
- d) Расстегните застежку полностью
- e) Поместите тело в пакет.
- f) Закрепите идентификационные бирки на теле.
- g) Закройте пакет
- h) Пакет готов к транспортировке.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование пакетов допускается только с соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21.

Хранение пакетов должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях при температуре окружающей среды от -25°C до +40°C, относительной влажности 100% при температуре +25°C, с исключением воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Повторное использование пакетов – не допускается.

Пересыпание медицинских отходов из пакетов - не допускается.

Применение пакетов, имеющих признаки бракованного изделия (разрывы, посторонние включения в поверхности пакетов) – не допускается.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пакетов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности пакета – 5 лет со дня приёмки ОТК предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения 5 лет от даты изготовления.

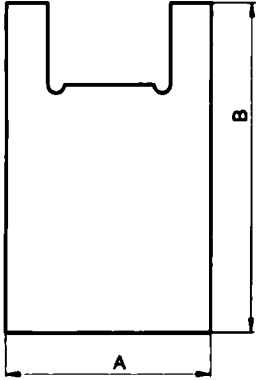
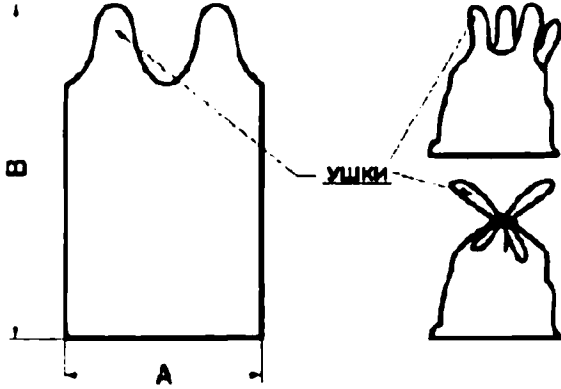
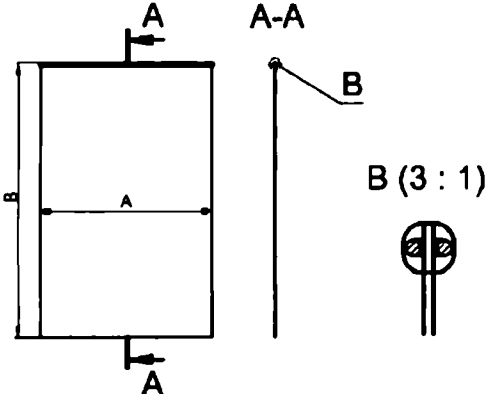
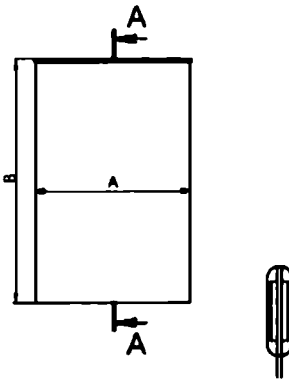
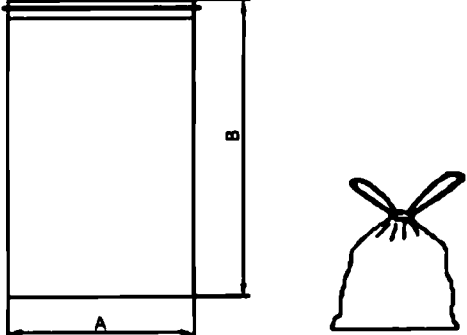
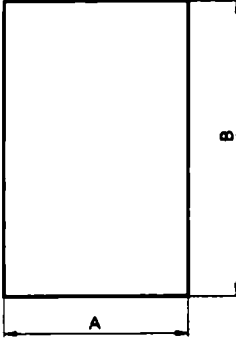
7 ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ (УНИЧТОЖЕНИЕ)


Изделия, на которые распространяются настоящие технические условия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке либо подлежат утилизации как бытовые отходы (класс А) в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


«Пакет одноразового использования для сбора, хранения, термической обработки и удаления медицинских отходов классов А, Б, В, Г» изготовлен в соответствии с ТУ 9398-002-267614810-2013 и признан годным к эксплуатации

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

 ПМ-01- А (Б,В,Г) Пакет для сбора, хранения и удаления отходов класса А, Б, В, Г одноразовый, с ручками	 ПМ-01-А (Б,В,Г) Пакет для сбора, хранения и удаления отходов класса А,Б,В,Г одноразовый ,с ушками
 ПМ-01-А (Б,В,Г)Пакет для сбора, хранения и удаления отходов класса А,Б,И,Г, одноразовый ,с лентой резиновой латексной	 ПМ-01-А (Б,В,Г) Пакет для сбора, хранения и удаления отходов класса А,Б,В,Г, одноразовый, с лентой резиновой не содержащей латекс
 ПМ-01-А (Б,В,Г) Пакет для сбора, хранения и удаления отходов класса А,Б,В,Г, одноразовый с лентой полиэтиленовой	 ПМ-01-А (Б,В,Г) Пакет для сбора, хранения и удаления отходов класса А,Б,В,Г, одноразовый

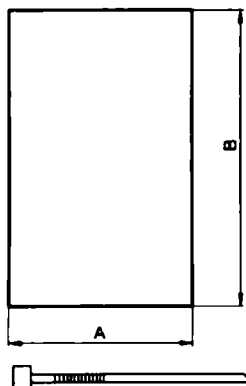

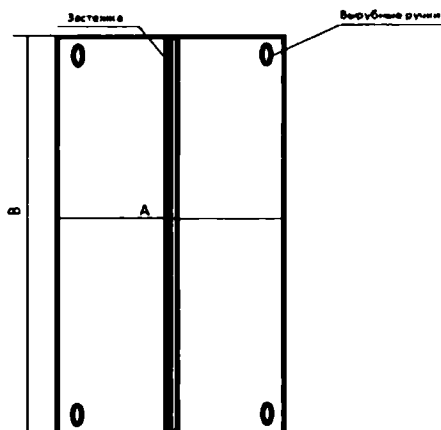ПМ-02-ТО-Б (В) Пакет для сбора, хранения, термической обработки и удаления отходов класса Б,В, одноразовый, со стяжкой



замок —молния,

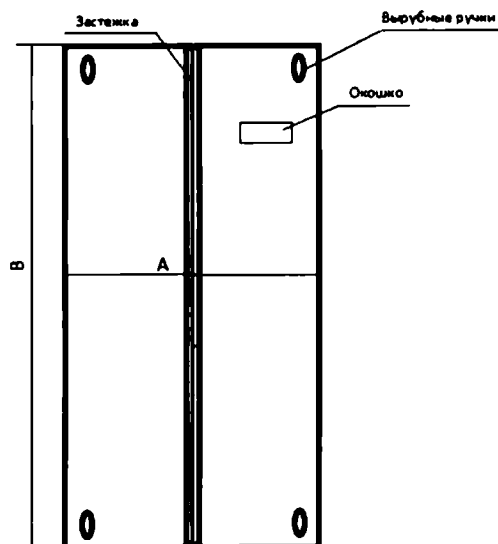


текстильная



застежка, лента контактная

ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый с вырубными ручками, без окошка



замок —молния,

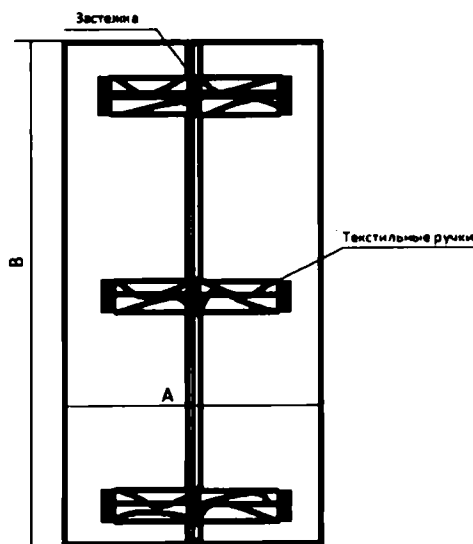


текстильная застёжка, контактная



лента

ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый с вырубными ручками, с окошком



замок —молния,

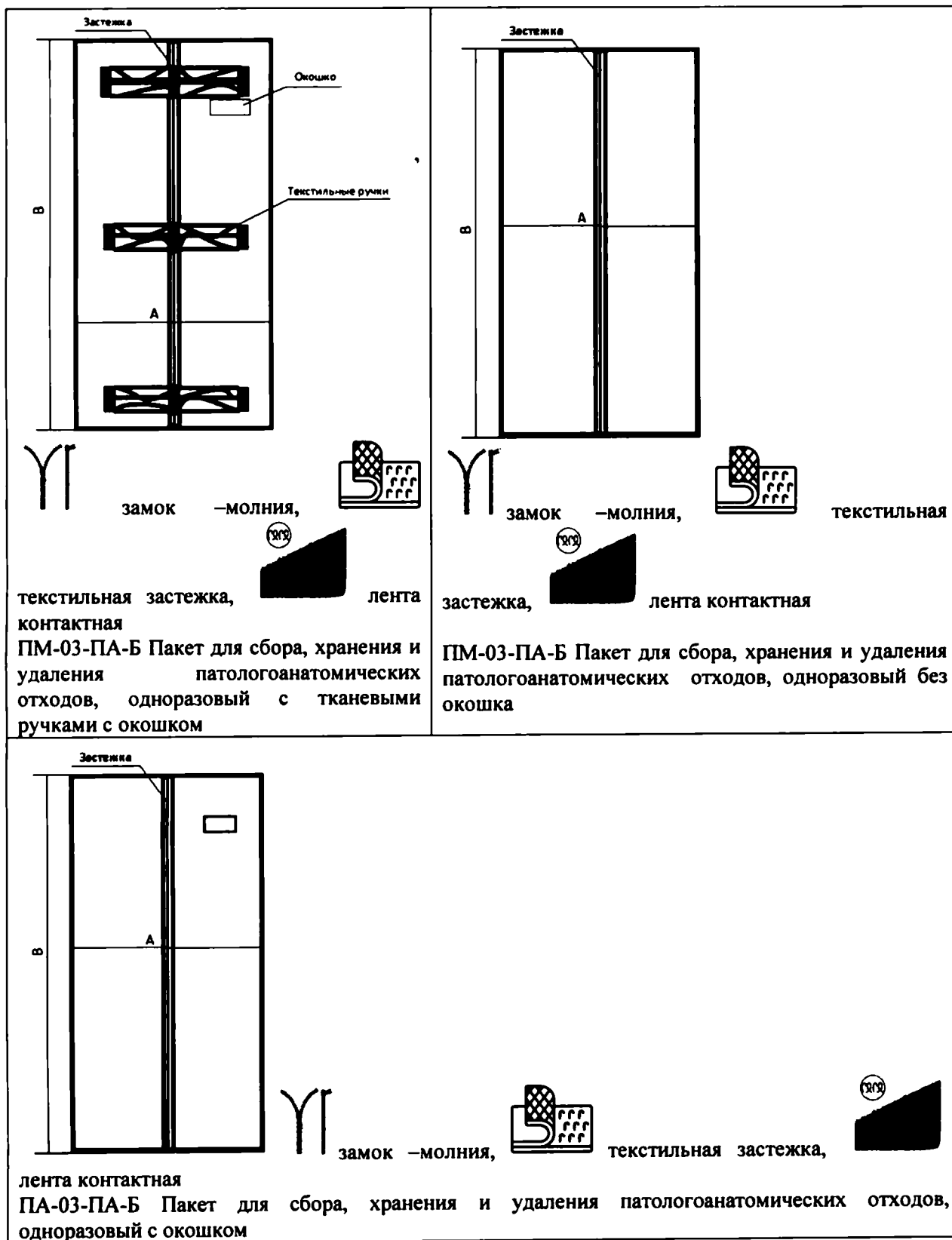


текстильная



застежка, лента контактная

ПМ-03-ПА-Б Пакет для сбора, хранения и удаления патологоанатомических отходов, одноразовый с текстильными ручками, без окошка



ООО «КМ-Проект»

В данном документе всего прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

22 листов

Директор ООО «КМ-Проект» А.П. Маврин

