

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Субботина Н.В.

20 сентября 2021 г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Держатель вакуумных систем забора крови механический ДВС-М

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** фиксация двусторонней иглы в системах вакуумного забора крови.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Держатель вакуумных систем забора крови механический ДВС-М представляет собой полый цилиндр, выполненный из полипропилена марки 21230 по ГОСТ 26996 или марки РРН250 GP/3 по ТУ 2211-006-93911504-2015 или материала аналогичного качества. Размерные характеристики и условия применения указаны в ТУ 9435-001-54215085-2009.
3. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ**
 1. Выберите размер иглки и вид пробирки в зависимости от проводимого анализа
 2. Наложите жгут
 3. Откройте капсулу иглы. Поворачивайте до разрыва доступного слоя изоляции. Удалите прозрачный колпачок, обнажая закрытый пробкой конец иглы. Не удаляйте чехол иглы. Соедините иглу и держатель до плотного соединения. Введите пробирку в держатель.
 4. Удалите чехол с иглы.
 5. Выполните венепункцию, держа иглу под углом приблизительно равным 30-ти градусам к руке пациента.
 6. Зафиксируйте держатель. Выполняя свободной рукой «захват шприца» - наденьте пробирку на конец держателя, прокалывая резиновую перегородку. Кровь потечет в пробирку за счет вакуума.
 7. Если достигнут необходимый объем и кровь перестала течь, осторожно удалите пробирку из держателя, сохраняя неподвижность держателя. Поместите большой палец руки, которой Вы будете удалять пробирку, на основание держателя. Медленно удалите пробирку. Резиновый клапан закроется для предотвращения попадания крови в держатель при удалении пробирки.
 8. Если нужно наполнить несколько пробирок, то поместите следующую пробирку в держатель. Кровь потечет в пробирку. Все время сохраняйте неподвижность держателя.
 9. Когда взятие крови завершено, удалите последнюю пробирку, затем удалите комплекс игла-держатель. Поместите стерильную повязку на место венепункции.
 10. Наденьте на иглу пластиковый колпачок или используйте пинцет для удаления иглки из держателя, и утилизируйте их путем автоклавирования или сжигания.
4. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** указаны в ТУ 9435-001-54215085-2009