

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СДТЛ»



Татузов Р. А.

« 13 » 08 20 24 г.

М. П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИНТ ПОДКЛАДОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОД ГИПСОВУЮ ПОВЯЗКУ
по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

г. Краснодар

2024

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в вариантах исполнения (далее по тексту – «изделие», «бинт»).

Наименование. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в вариантах исполнения:

1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: вискоза:

1.1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре;

1.2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре;

1.3. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре;

1.4. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;

1.5. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;

1.6. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;

1.7. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре;

1.8. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной таре;

1.9. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;

1.10. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;

1.11. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;

1.12. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре;

2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: полиэстер:

- 2.1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре;
- 2.2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре;
- 2.3. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре;
- 2.4. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;
- 2.5. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;
- 2.6. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;
- 2.7. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре;
- 2.8. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной упаковке;
- 2.9. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×4 м 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;
- 2.10. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;
- 2.11. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;
- 2.12. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре.

Назначение. Бинты предназначены для дополнительной защиты кожи пациента в качестве подкладки при наложении гипсовой повязки.

Область применения. Бинт применяется в хирургии и ортопедии.

Информация о потенциальных потребителях. Бинты используются квалифицированным медицинским персоналом в лечебно-профилактических учреждениях.

Показания к применению.

Применяется для дополнительной защиты кожи в качестве подкладки при наложении гипсовой повязки.

Физический принцип действия. изделие накладывается на неповрежденную кожу пациента (чаще на трубчатый трикотажный бинт) в качестве подкладки под гипс с целью защиты:

- кожи пациента от различных трений, ссадин и чрезмерного перетягивания гипсовой

повязкой;

- кожи пациента от раздражений и тепла от затвердевшего гипсового бинта;
- от повреждений, которые могут возникнуть в результате непосредственного контакта кожи пациента с затвердевшим краем гипса, с целью повышения комфорта и безопасности во время использования изделия.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость материалов.

Побочные эффекты применения изделия. При индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлено изделие, возможны местные аллергические реакции.

Классификация. По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса 1 по ГОСТ 31508 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Изделия, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, при хранении устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С.

Изделия, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С.

Медицинское изделие долговременно (более 30 суток) контактирует с поверхностью неповрежденной кожи человека и относится к категории С по ГОСТ ISO 10993-1.

Медицинское изделие в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования изделия относится к классу Г, в зависимости от воспринимаемых механических воздействий изделие относится к группе 3 по ГОСТ 20790.

Вид медицинского изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»:

260680 – «Подкладка медицинская текстильная общего назначения».

Изделие является медицинским изделием однократного применения.

Изделие поставляется нестерильным и не подлежит стерилизации.

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Описание основных свойств бинта

Бинты подкладочные представляет из себя перевязочное изделие без швов, скрученное в рулон или сложенное в гармошку, имеющее равномерную структуру без посторонних вкраплений, пятен и дыр. Бинты «Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: полиэстер» изготовлены из синтетических волокон – 100% полиэстер. Бинты «Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: вискоза» изготовлены из волокон натурального происхождения – 100% вискозы. Изделия используется в качестве дополнительной прослойки между кожей травмированной части тела и гипсовой повязкой, защищают кожу от нагревания, от раздражений, трений и ссадин, давления и неровностей со стороны гипсовой повязки. Изделие рекомендуется применять в сочетании с трубчатым бинтом в качестве подкладки под гипсовую повязку.

Внешний вид бинта подкладочного из вискозы и полиэстера, а также индивидуальная упаковка с маркировкой представлены на рисунках 1-5.

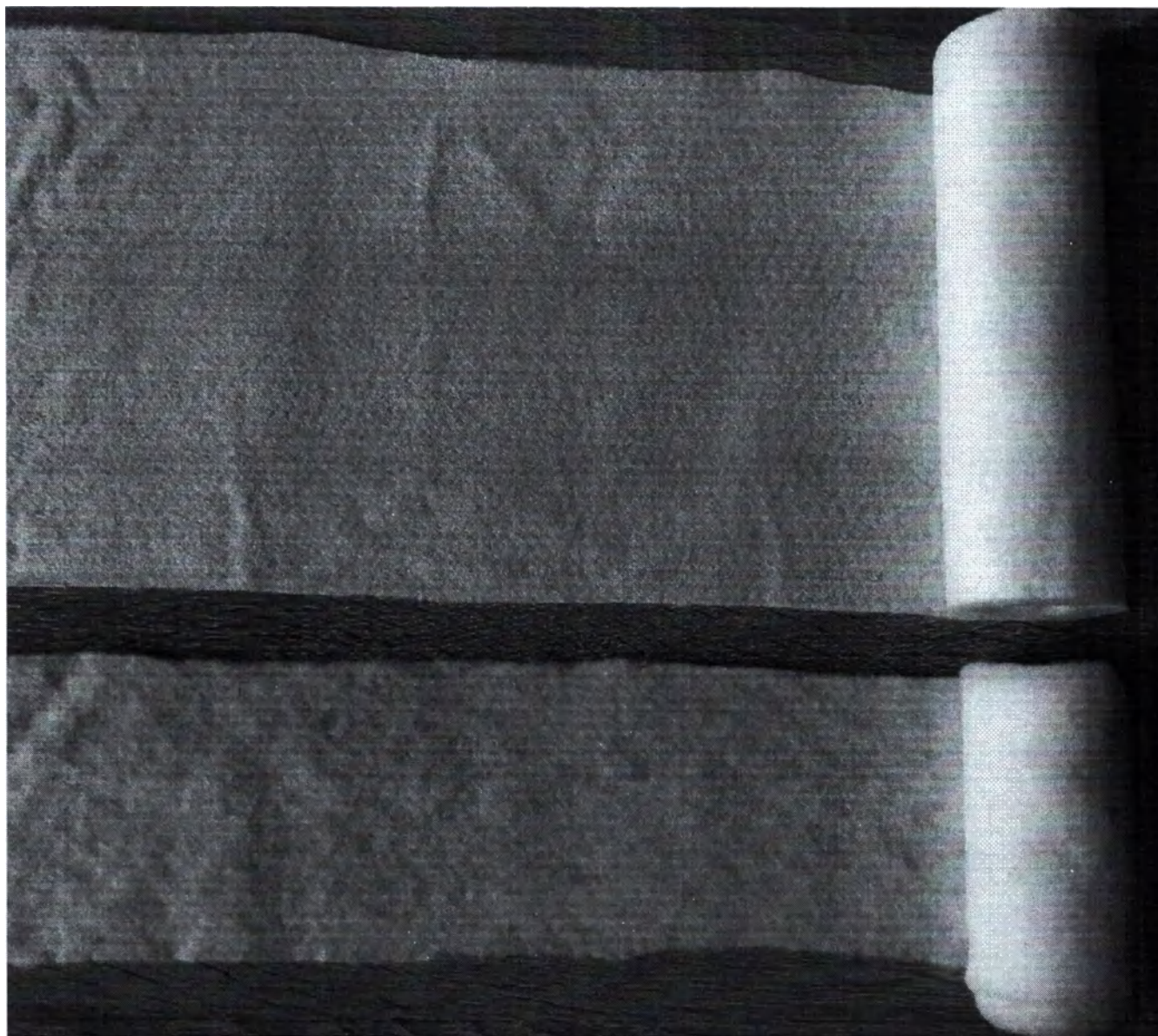


Рисунок 1 - Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Рулон в размотанном виде (изображение сверху).

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения: Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре. Рулон в размотанном виде (изображение снизу).



Рисунок 2 - Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре. Внешний вид.



Рисунок 3 - Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре. Внешний вид.

1.2 Значения линейных размеров, размеров изделия в сложенном виде и масса изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Линейные размеры, размеры изделия в сложенном виде и масса изделия

Вариант исполнения	Размер				Масса изделия, г
	Линейный		В сложенном в рулон виде		
	Ширина, см	Длина, м	Длина, см	Диаметр, см	
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре,;	8	3	8	6,5	21,6
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре;	10	3	10	6,5	27
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре;	12	3	12	6,5	32,4
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	15	3	15	6,5	45,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	20	3	20	6,5	54
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;	25	3	25	6,5	67,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре;	8	4	8	7,5	32,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной таре;	10	4	10	7,5	39,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;	12	4	12	7,5	46,5

Вариант исполнения	Размер				Масса
	15	4	15	7,5	
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;					61
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×4 м 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;	20	4	20	7,5	81,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре;	25	4	25	7,5	97,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре;	8	3	8	6,5	19,2
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре;	10	3	10	6,5	24
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре;	12	3	12	6,5	27,5
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	15	3	15	6,5	36
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	20	3	20	6,5	46
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;	25	3	25	6,5	57
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре;	8	4	8	9,7	25,6
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной упаковке;	10	4	10	9,7	32
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×4 м 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;	12	4	12	9,7	38,4

Вариант исполнения	Размер				Масса
	15	4	15	9,7	
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;					48
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;	20	4	20	9,7	64
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре.	25	4	25	9,7	80
Допустимые отклонения	±0,5 см	±10 %	±0,5 см	±1 см	±10 %

1.3 Сведения о сырье и материалах изготовления бинтов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сырье и материалы

Наименование варианта исполнения изделия	Сырье и материалы	Производитель
1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: вискоза: 1.1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре.; 1.2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре; 1.3. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре; 1.4. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 1.5. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 1.6. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной	Полотно нетканое иглопробивное термоскрепленное по ТУ 13.95.10-002-11758252- 2017, вискоза 100%, 90 г/м²	ООО «Ольгинская Мануфактура», Россия

упаковке, 45 шт. в транспортной таре; 1.7. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре; 1.8. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной таре; 1.9. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре; 1.10. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 1.11. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×4 м 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 1.12. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре		
2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: полиэстер; 2.1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре; 2.2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре; 2.3. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре; 2.4. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 2.5. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 2.6. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;	Полотно нетканое иглопробивное термоскрепленное, полиэстер 100 %, 80 г/м²	ООО «Весь Мир», Россия

2.7. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре; 2.8. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной упаковке; 2.9. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре; 2.10. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 2.11. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 2.12. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре		
Индивидуальная упаковка	Полипропиленовый пакет, ГОСТ 12302 полипропилен	ООО «Примапак», Россия
	Этикетка с клеевым слоем, полипропилен	ООО «Упаковка и Сервис», Россия
Транспортная тара	Короб из гофрированного картона, ГОСТ Р 52901	ООО «Картон Тара», Россия
	Лента полиэтиленовая с липким слоем, ГОСТ 20477 полиэтилен	ООО «Упаковка и Сервис», Россия

1.4 Сведения о технических характеристиках для материала изделия приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики материала изделия

Наименование варианта исполнения изделия	Поверхностная плотность, не менее, г/м ²	Толщина материала, мм	Разрывная нагрузка, не менее, Н		Витываемость, г/г
			вдоль	поперек*	
1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: вискоза: 1.1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре; 1.2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре; 1.3. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре; 1.4. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 1.5. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 1.6. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре; 1.7. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре; 1.8. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной таре; 1.9. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;	90	0,9	50	50	14*

1.10. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 1.11. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×4 м 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 1.12. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре					
2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: полиэстер: 2.1. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре; 2.2. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре; 2.3. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре; 2.4. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 2.5. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре; 2.6. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре; 2.7. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре; 2.8. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной упаковке;	60	0,9	50	50	17**

2.9. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре; 2.10. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 2.11. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре; 2.12. Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре					
Допустимые отклонения	—	±20 %	—	*±10 %	**±25 %

2 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1 Комплектность поставки бинтов

1) Изделия, упакованные в индивидуальную упаковку в количестве 1 штуки, поставляются в транспортной таре в количестве, согласно таблице 4.

2) Инструкция по применению в комплекте поставки не предусмотрена. Все необходимые для потребителя сведения в достаточном объеме изложены в составе маркировки индивидуальной упаковки.

Таблица 4 – Комплектность

Вариант исполнения	Количество бинтов в единице транспортной тары, шт.
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре;	150
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре;	110
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре;	104
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	55
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	55
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;	45
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре;	120
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной таре;	100
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;	90
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;	50
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;	50
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре;	40
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре;	150
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре;	110
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре;	104
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	55
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре;	55

Вариант исполнения	Количество бинтов в единице транспортной тары, шт.
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре;	45
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре;	120
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной упаковке;	100
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре;	90
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;	50
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре;	50
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре.	40

2.2 Указания по применению

1) Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с принципом действия и правилами применения (в соответствии с инструкцией по применению), требованиями изготовителя, предъявляемые к эксплуатации изделия.

2) После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в индивидуальной упаковке должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.

3) Изделие пригодно к эксплуатации в закрытых отапливаемых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25°C.

4) Перед наложением подкладки необходимо надеть перчатки медицинские.

5) Рекомендуется наложить на кожу травмированной части тела трубчатый ортопедический бинт в качестве первого слоя подкладки.

6) Открыть индивидуальную упаковку, достать изделие.

7) Подкладку из подкладочного бинта следует накладывать достаточно плотно, чтобы не выступали загибы, по спирали. Каждый ход подкладочного бинта должен перекрывать предыдущий примерно наполовину. Подкладочный бинт не растягивать.

8) Отрезать излишек подкладочного бинта и зафиксировать его.

9) Изделие использовать однократно. Повторное применение использованного бинта/части бинта запрещено. Неиспользованный бинт/часть бинта в открытой упаковке может применяться по назначению в соответствии с рекомендациями.

Санитарно-гигиеническая обработка. Изделие не является стерильным и не подлежит стерилизации. Изделие не подлежит санитарной обработке. Изделие однократного использования.

2.3 Маркировка

1) Маркировка индивидуальной упаковки выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 20790 (п. 8.1.3) и настоящих технических условий. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетки) – представлена на рис. 6.1-6.12 для бинтов из вискозы и на рис. 7.1-7.12 для бинтов из полиэстера. Расшифровка символов маркировки (по ГОСТ Р ИСО 15223-1) приведена в таблице 5.

2) Маркировка транспортной тары выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192. Макет маркировки транспортной тары представлен на рис. 8 (для бинтов из вискозы) и рис. 9 (для бинтов из полиэстера). Расшифровка символов (по ГОСТ Р ИСО 15223-1)/манипуляционных знаков (по ГОСТ 14192) маркировки приведена в таблице 5.

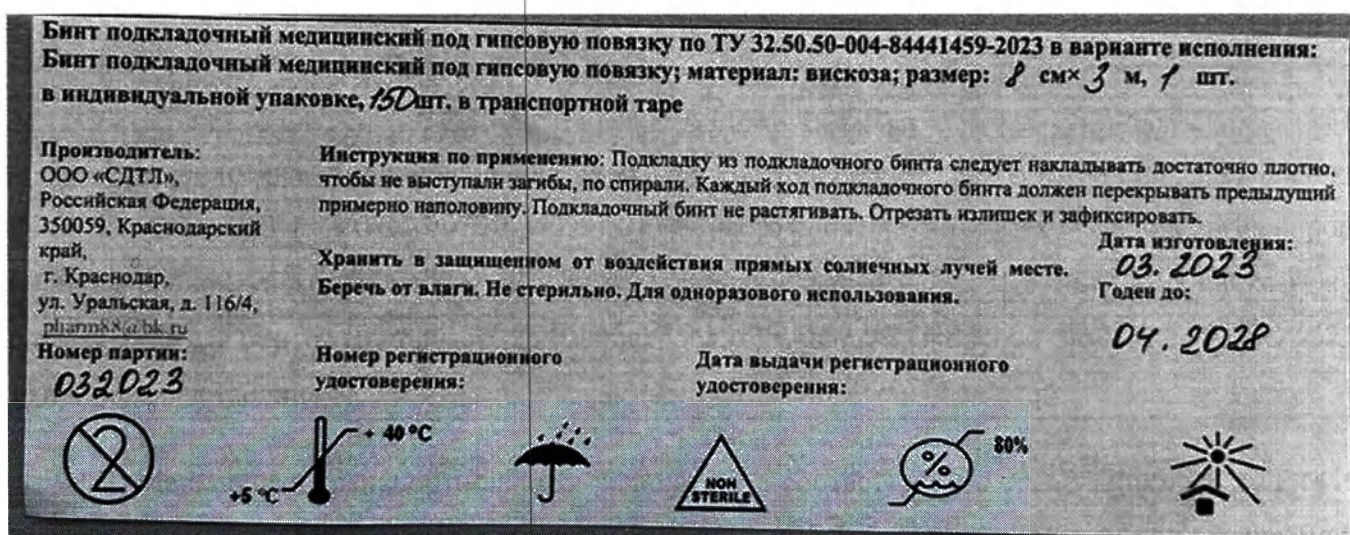


Рисунок 6.1 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

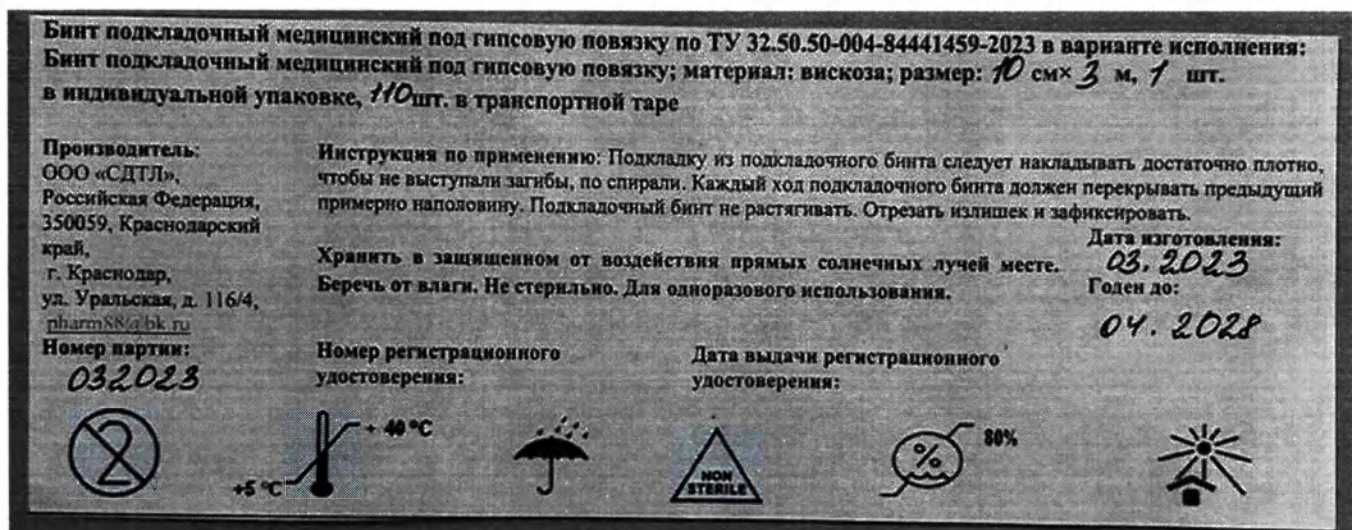


Рисунок 6.2 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

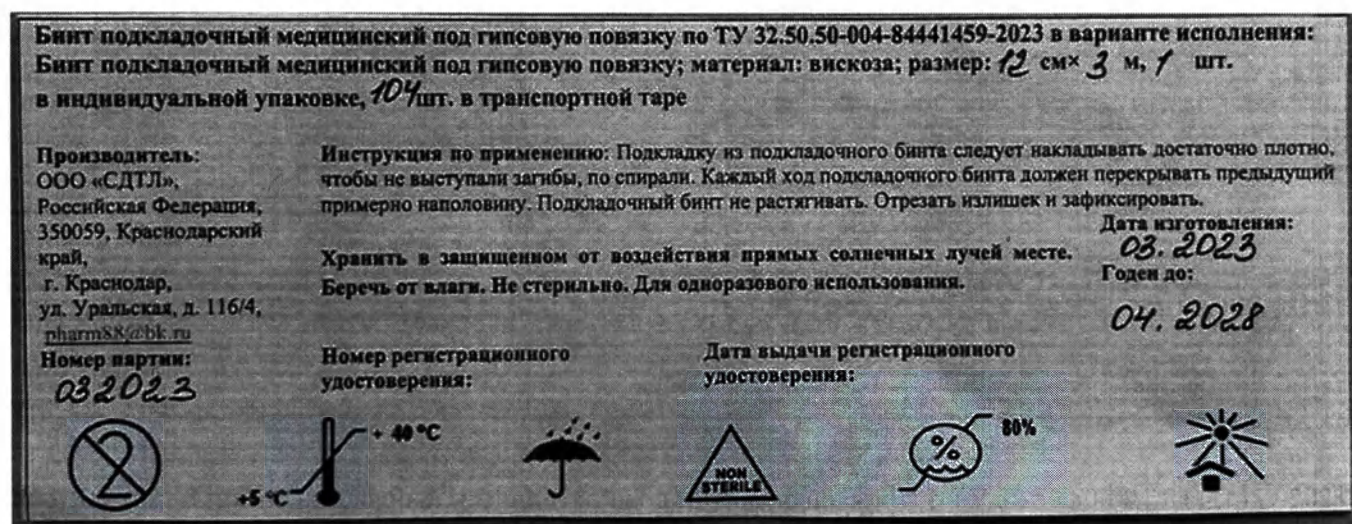


Рисунок 6.3 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

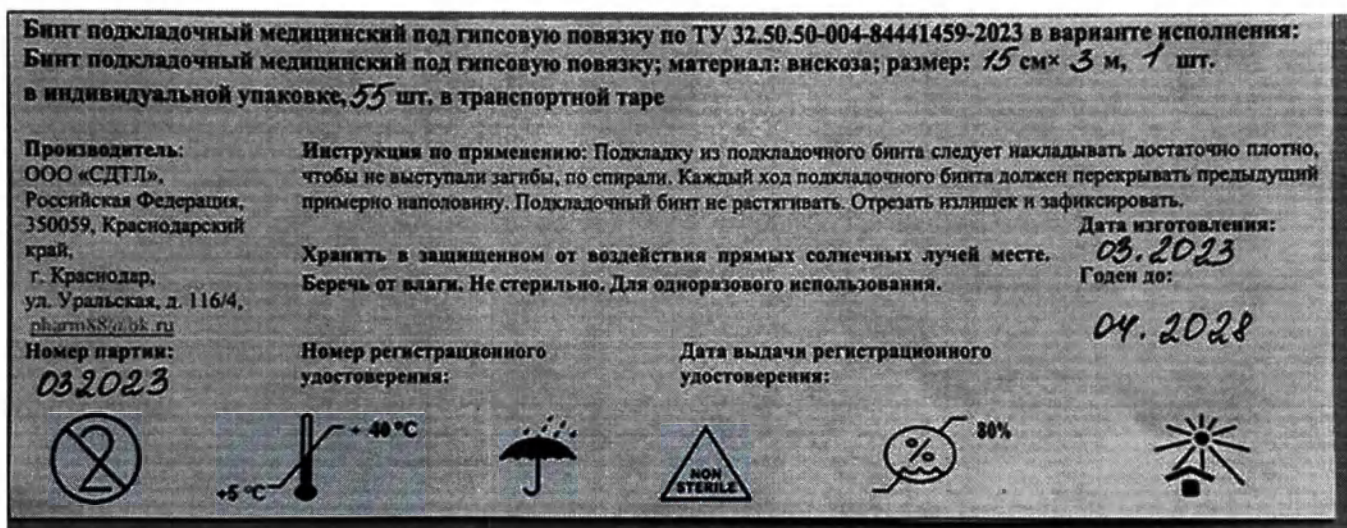


Рисунок 6.4 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

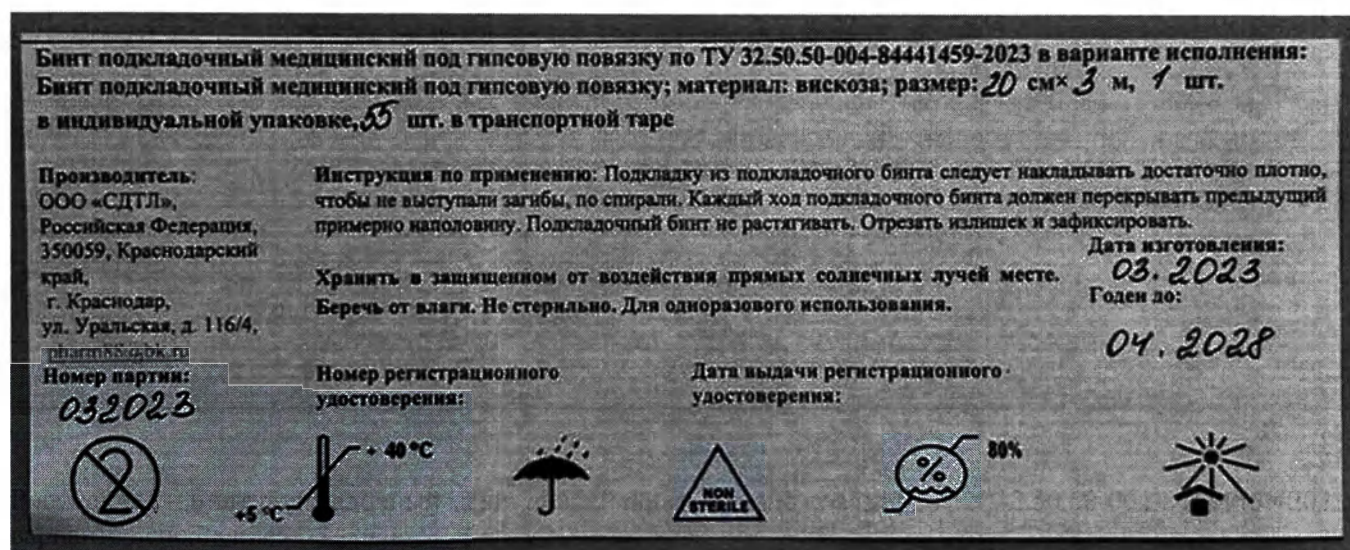


Рисунок 6.5 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).



Рисунок 6.6 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см × 3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре Индивидуальная упаковка с маркировкой.



Рисунок 6.7 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 8 см × 4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).



Рисунок 6.8 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 10 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).



Рисунок 6.9 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 12 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

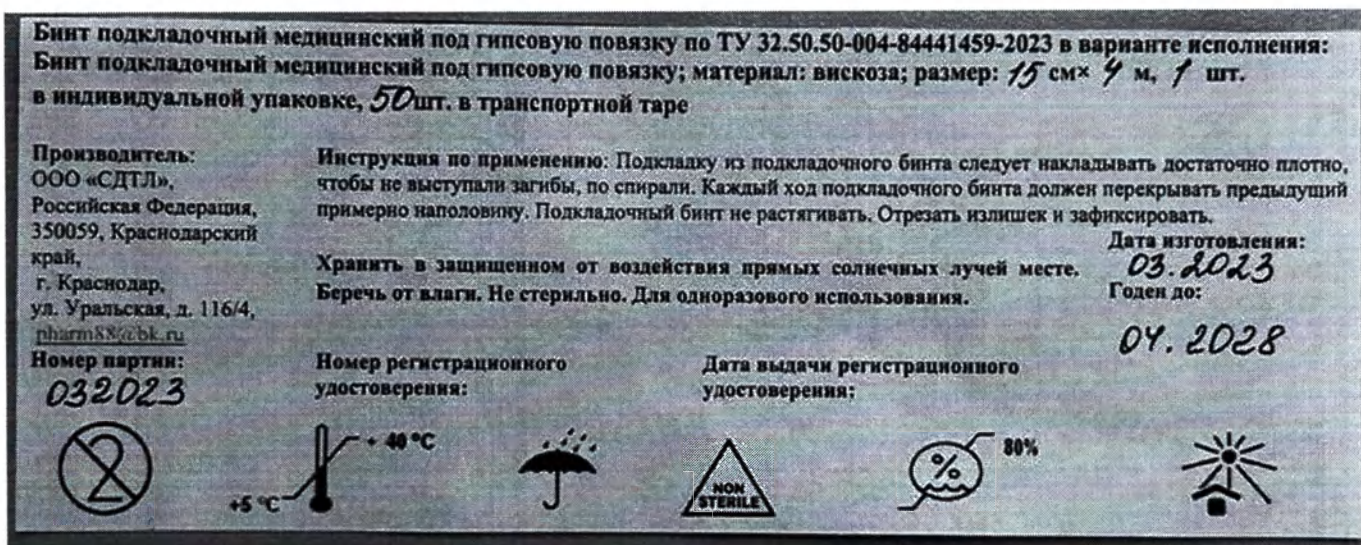


Рисунок 6.10 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

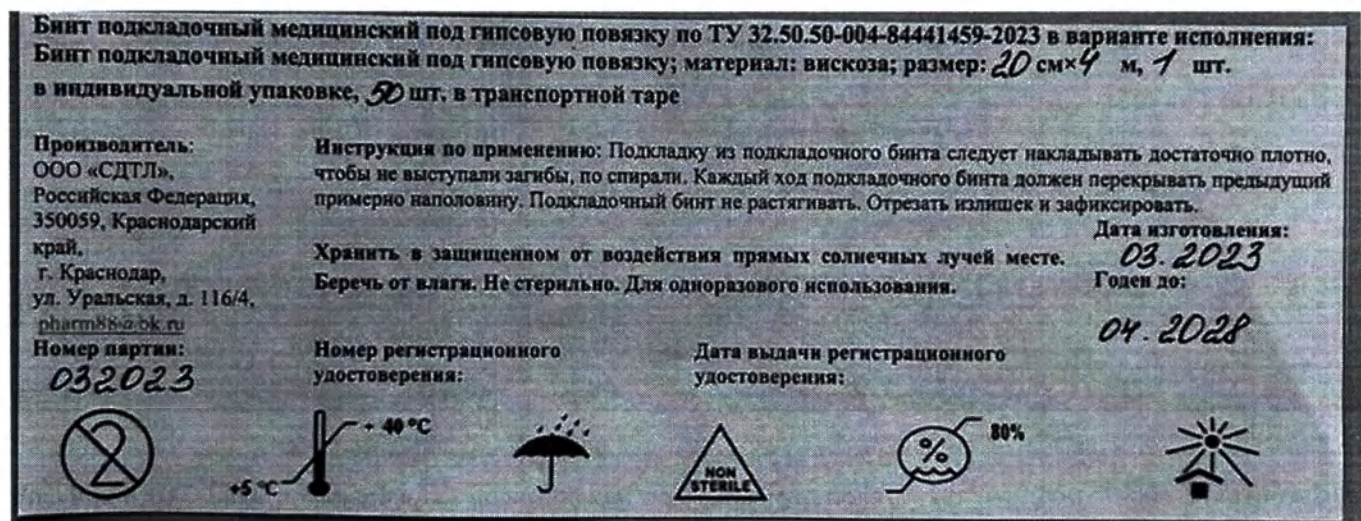


Рисунок 6.11 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка)



Рисунок 6.12 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 25 см × 4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

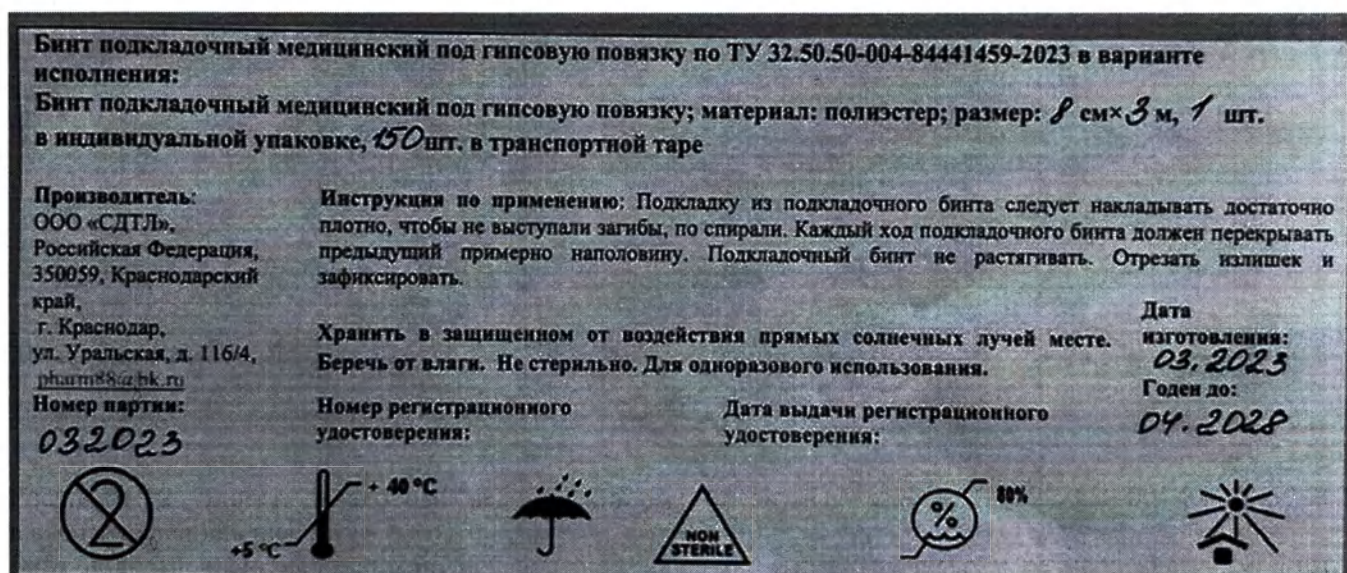


Рисунок 7.1 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см × 3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 150 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

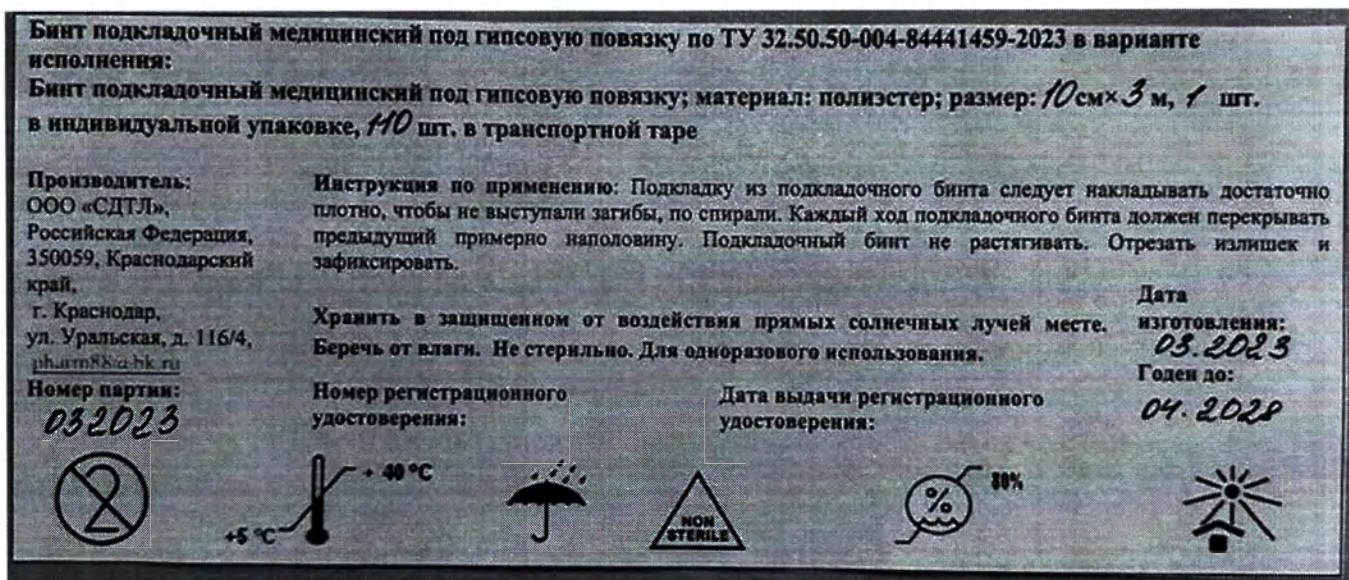


Рисунок 7.2 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 110 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

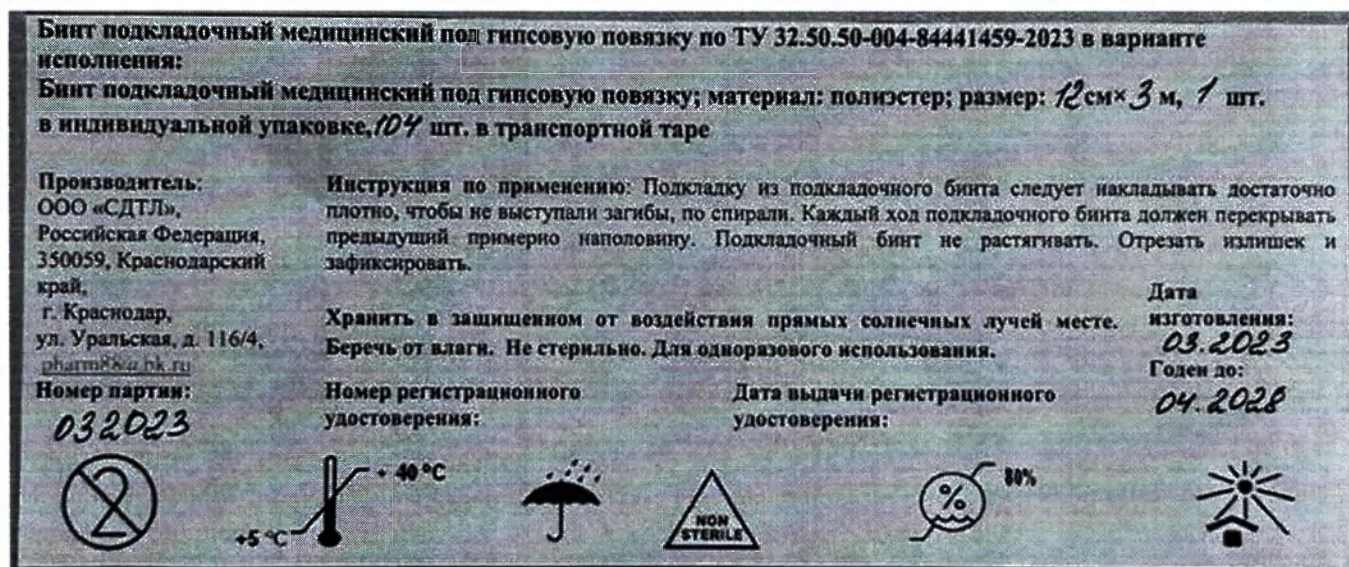


Рисунок 7.3 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 104 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

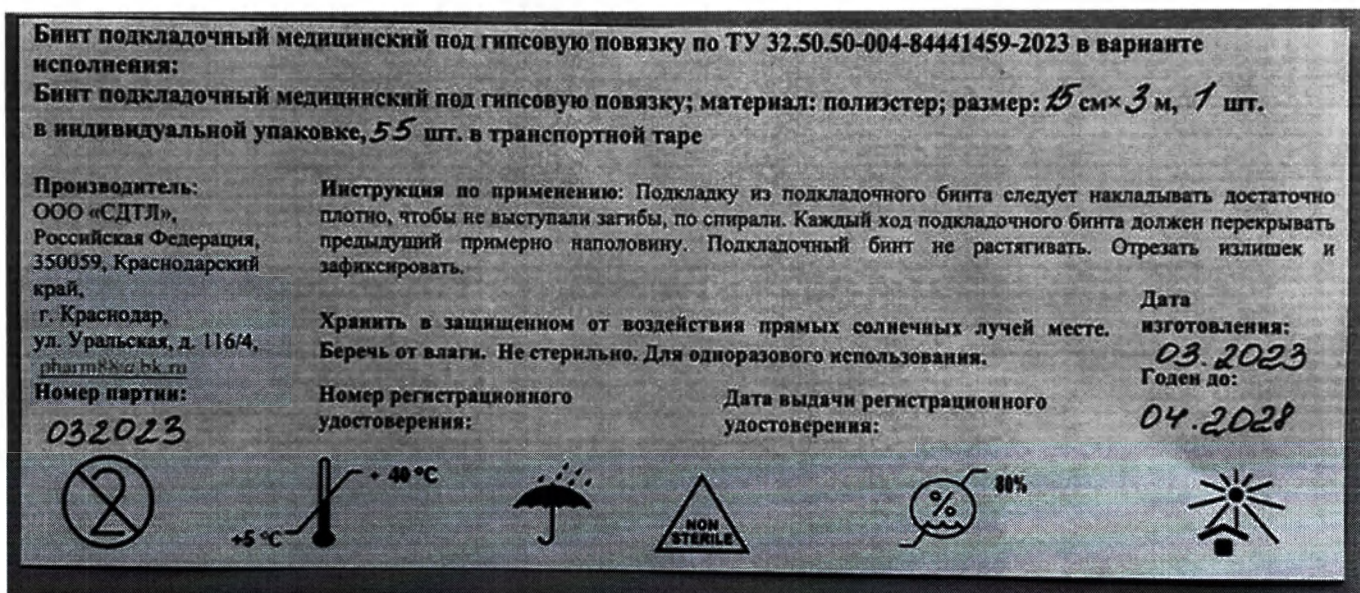


Рисунок 7.4 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

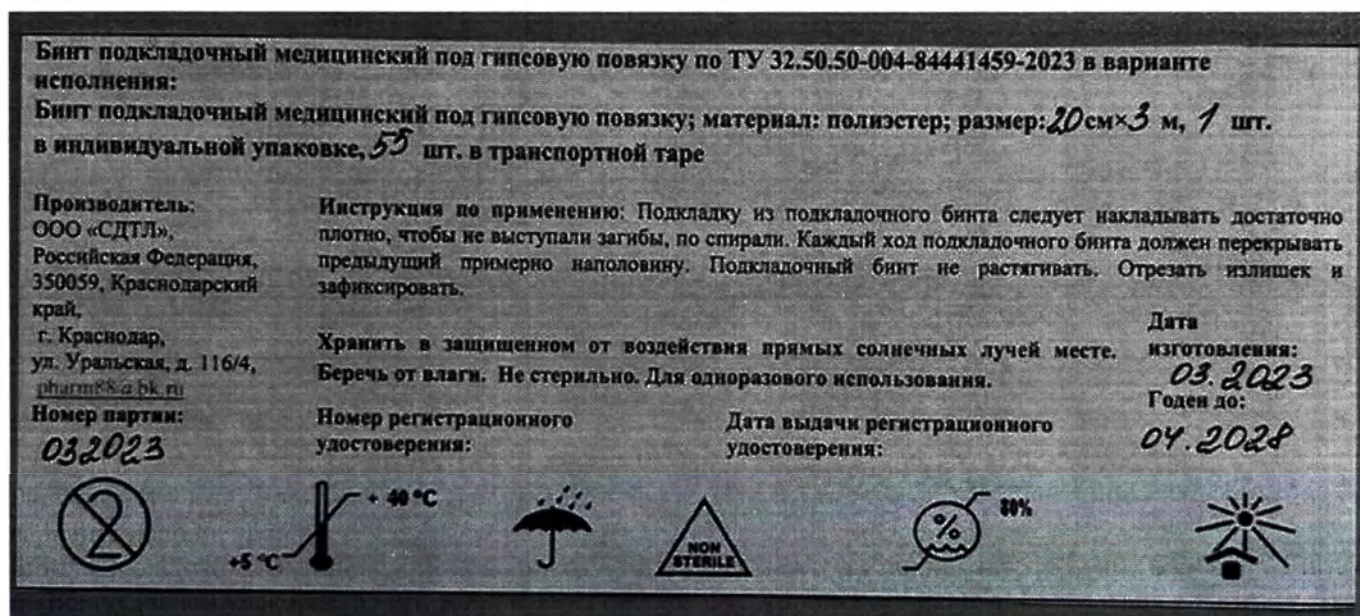


Рисунок 7.5 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

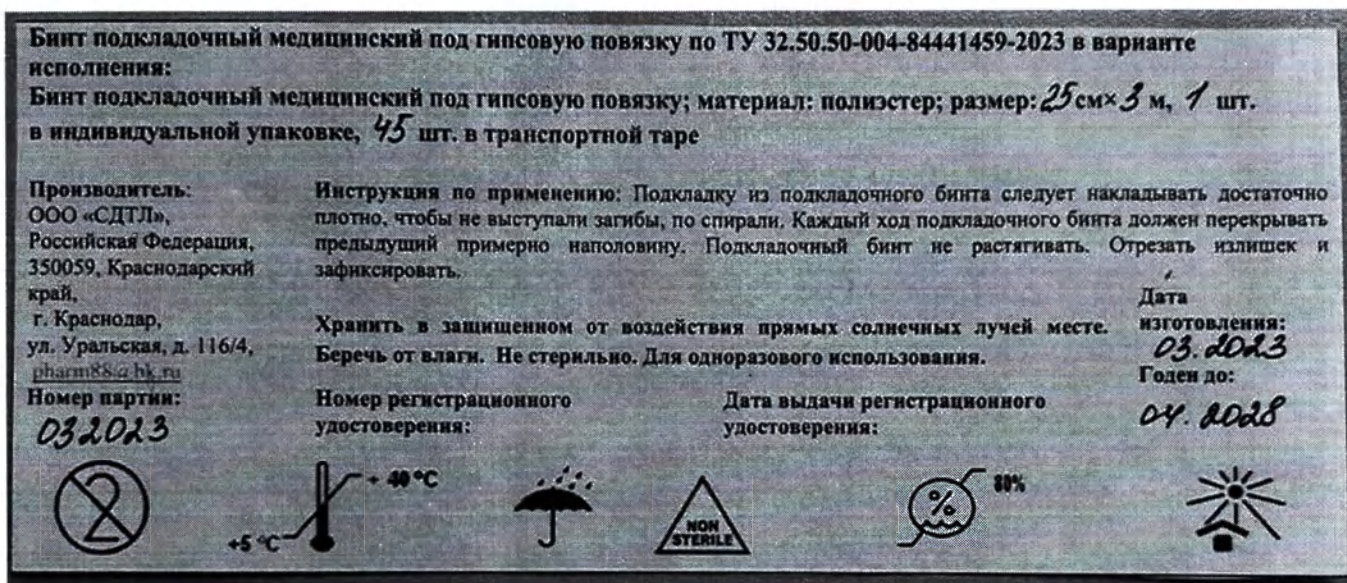


Рисунок 7.6 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см × 3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 45 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки.

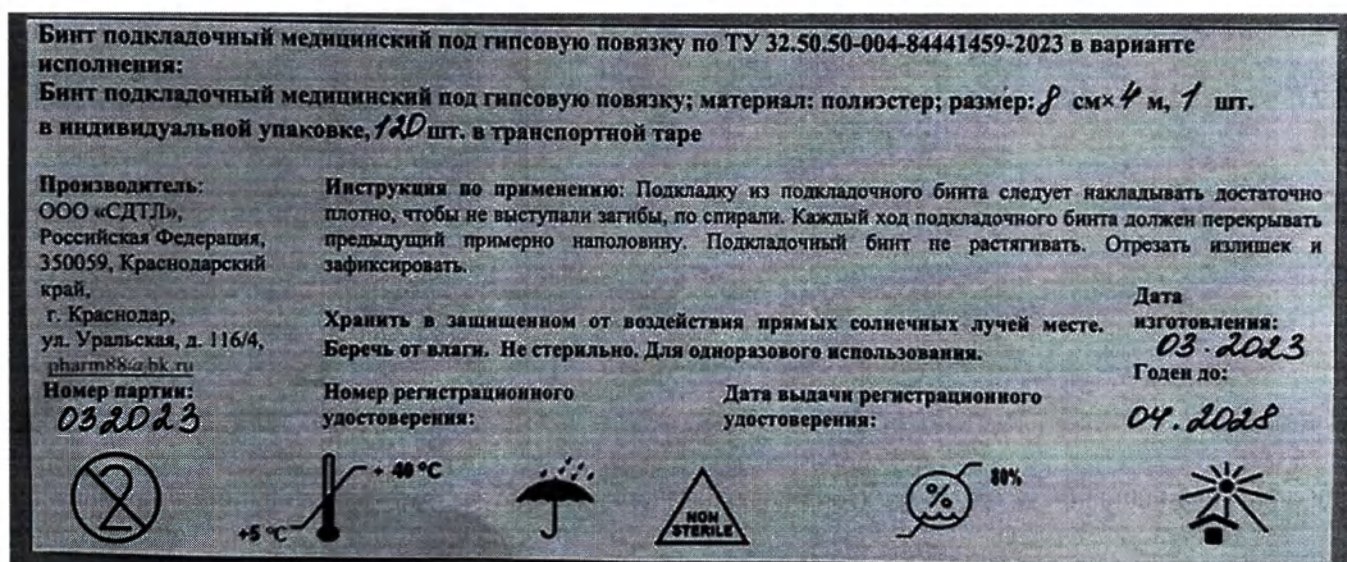


Рисунок 7.7 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 8 см × 4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 120 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

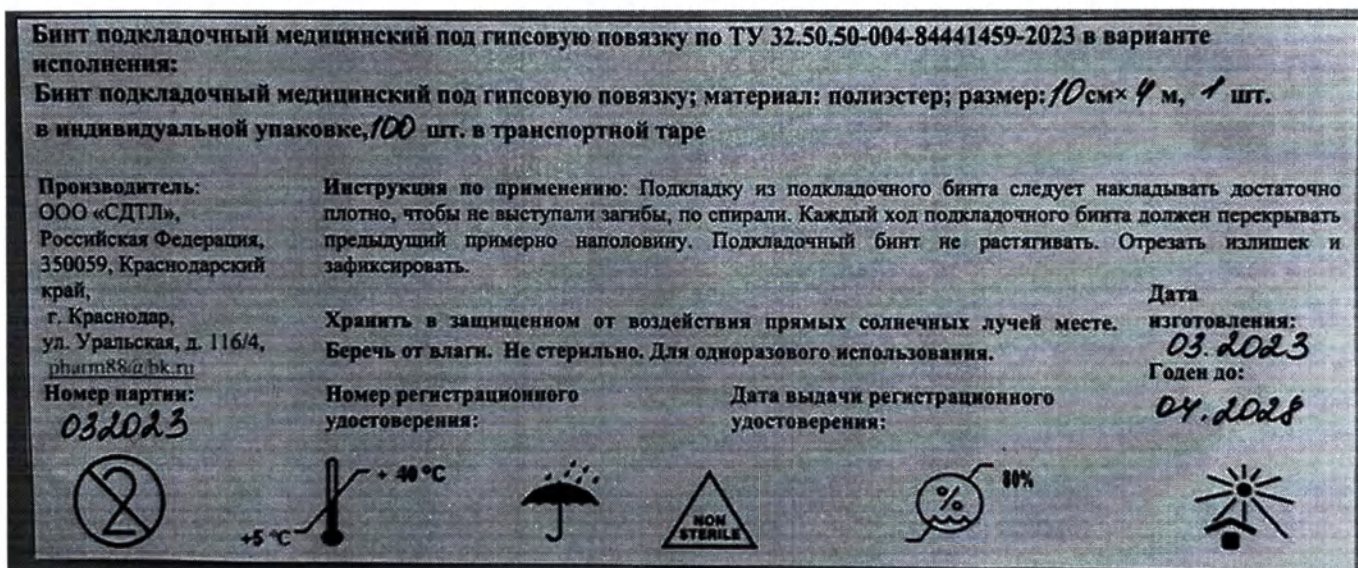


Рисунок 7.8 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 10 см × 4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 100 шт. в транспортной упаковке. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

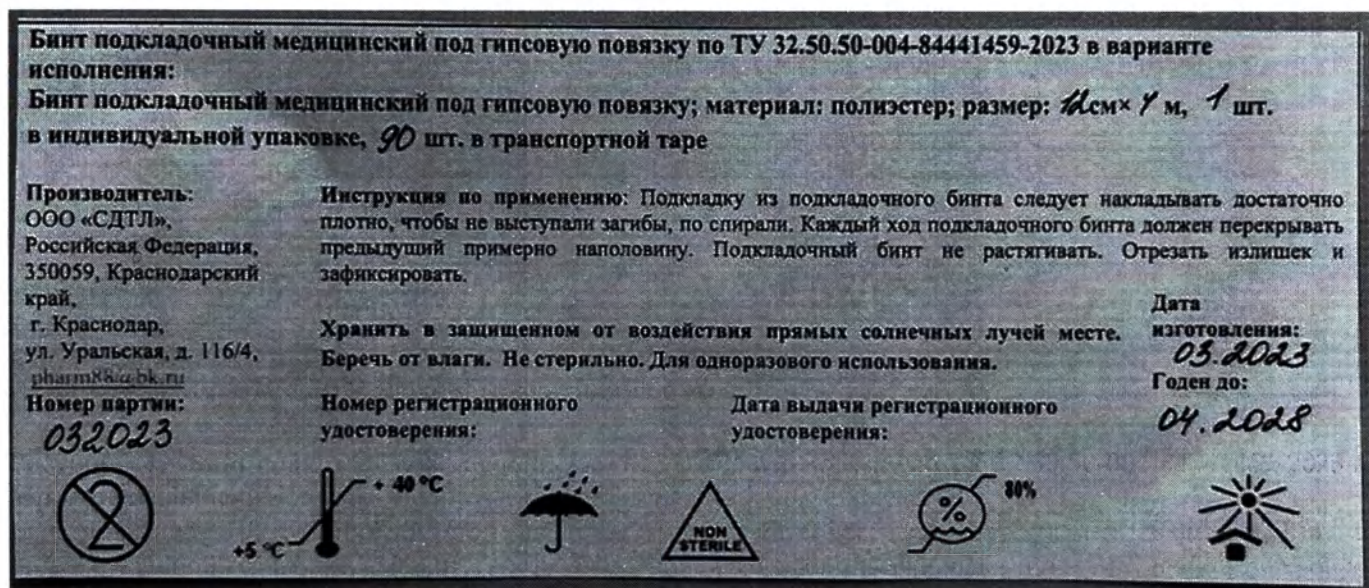


Рисунок 7.9 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 12 см × 4 м 1 шт. в индивидуальной упаковке, 90 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

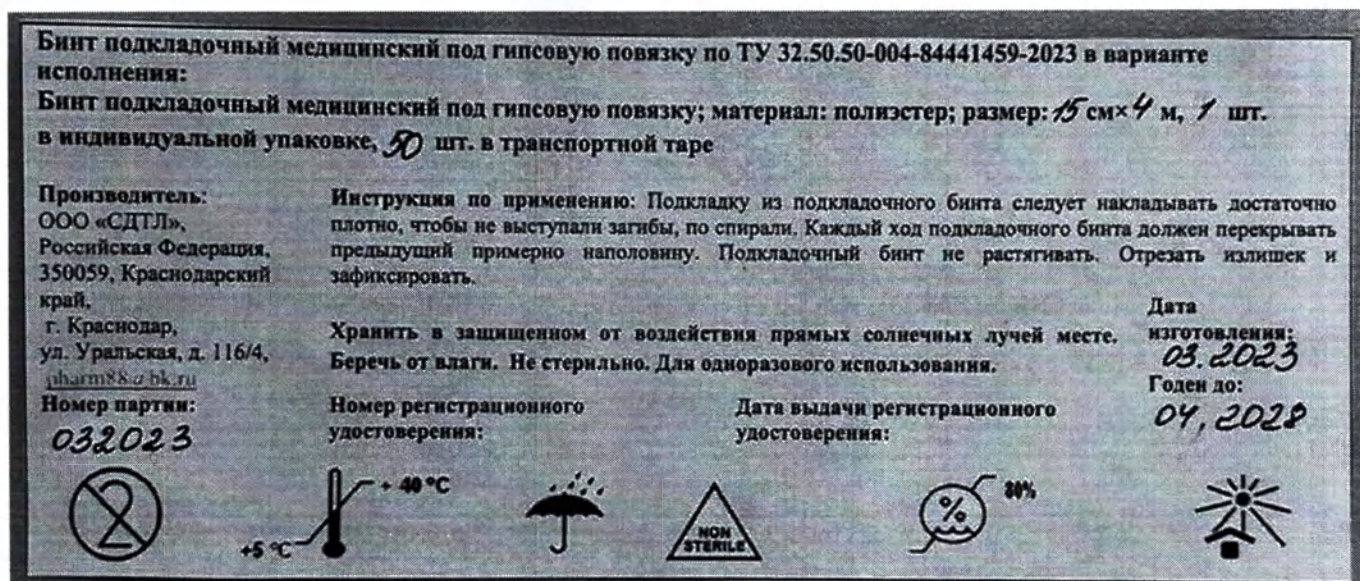


Рисунок 7.10 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 15 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

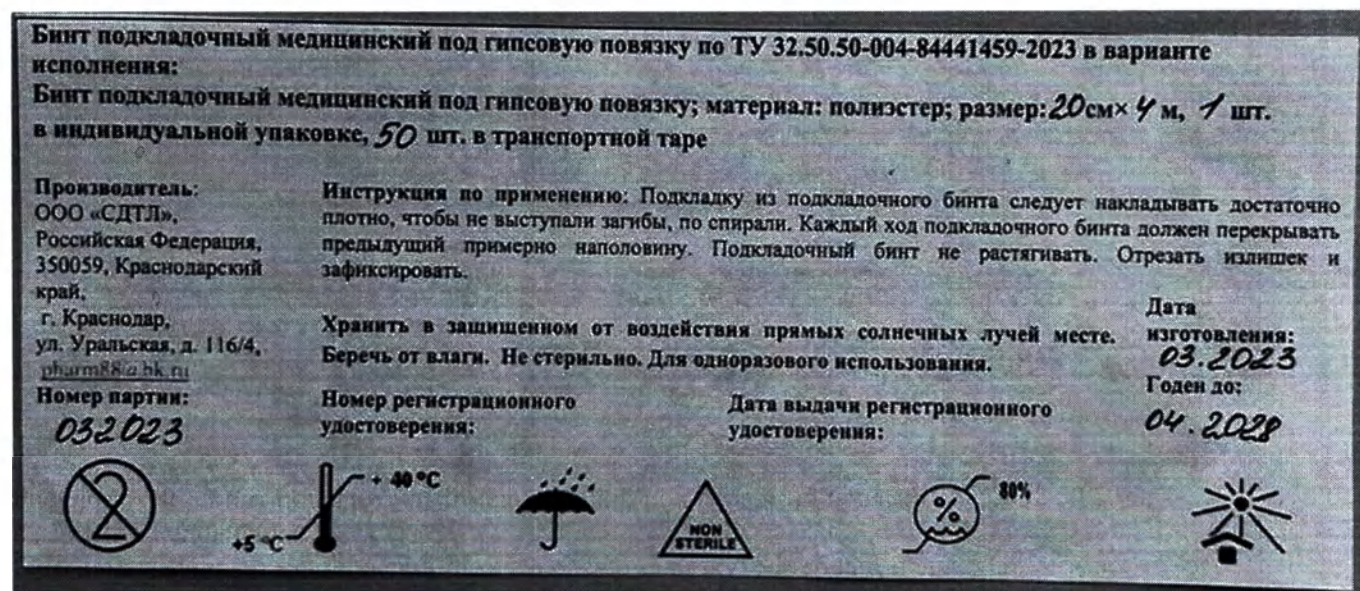


Рисунок 7.11 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 50 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка).

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см × 4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре

Производитель: ООО «СДТЛ», Российская Федерация, 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 116/4, phant88@bk.ru Номер партии: 032023	Инструкция по применению: Подкладку из подкладочного бинта следует накладывать достаточно плотно, чтобы не выступали загибы, по спирали. Каждый ход подкладочного бинта должен перекрывать предыдущий примерно наполовину. Подкладочный бинт не растягивать. Отрезать излишек и зафиксировать. Хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте. Беречь от влаги. Не стерильно. Для одноразового использования. Номер регистрационного удостоверения:	Дата изготовления: 03.2023 Годен до: 04.2028 Дата выдачи регистрационного удостоверения:
--	---	--





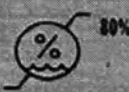



Рисунок 7.12 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 25 см × 4 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 40 шт. в транспортной таре. Маркировка индивидуальной упаковки (этикетка)

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза
размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре

Количество изделий в транспортной упаковке, шт.:

Габаритные размеры, м.:

0,48x0,37x0,20

Масса брутто, кг:

Грузоотправитель:



ООО «СДТЛ»,
Российская Федерация,
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 116/4
pharm88@bk.ru

Грузополучатель:



Дата изготовления:

Условия хранения: при температуре от плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.





Номер партии:

Номер регистрационного удостоверения:

Дата выдачи регистрационного удостоверения:

Гарантийный срок годности: 5 лет.

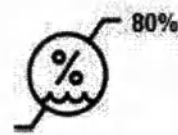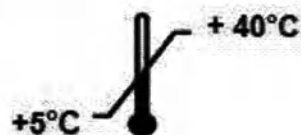

Беречь от влаги.

Хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

Условия транспортирования: крытыми транспортными средствами, при температуре от минус 50 °С до плюс 50°С и относительной влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С.

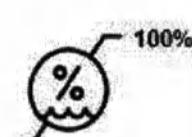
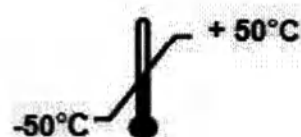


Рисунок 8 – Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: вискоза; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Макет маркировки транспортной тары.

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре

Количество изделий в транспортной упаковке, шт.:

Габаритные размеры, м.:

0,48x0,37x0,20

Масса брутто, кг:

Грузоотправитель:



ООО «СДТЛ»,
Российская Федерация,
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 116/4
phatm88@bk.ru

Грузополучатель:



Дата изготовления:



Номер партии:

Номер регистрационного
удостоверения:


Дата выдачи регистрационного
удостоверения:

Гарантийный срок годности: 5 лет.

Беречь от влаги.

Хранить в защищенном от воздействия прямых
солнечных лучей месте.

Условия хранения: при температуре от
плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной
влажности до 80% при температуре плюс
25 °С в отапливаемых и вентилируемых
складах, хранилищах с кондициони-
рованием воздуха, расположенных в
любых макроклиматических районах.

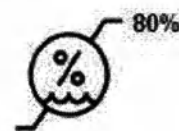

Условия транспортирования: крытыми
транспортными средствами, при
температуре от минус 50 °С до плюс 50°С
и относительной влажности до 100 % при
температуре плюс 25 °С.

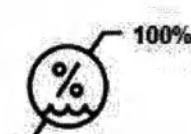
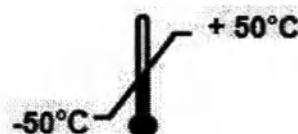


Рисунок 9 - Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023 в варианте исполнения:

Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку; материал: полиэстер; размер: 20 см×3 м, 1 шт. в индивидуальной упаковке, 55 шт. в транспортной таре. Макет маркировки транспортной тары.

Таблица 5 – Расшифровка символов/манипуляционных знаков маркировки

Изображение символа/манипуляционного знака	Расшифровка символа/манипуляционного знака	Нормативный документ
На индивидуальной упаковке		
	Не стерильно	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Температурный диапазон	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Диапазон влажности	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Не допускать воздействия влаги	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Запрет на повторное применение	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Не допускать воздействие солнечного света	ГОСТ Р ИСО 15223-1
На транспортной таре		
	Изготовитель	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Код партии	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Диапазон влажности	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Дата изготовления	ГОСТ Р ИСО 15223-1
	Предел температуры	ГОСТ 14192
	Беречь от солнечных лучей	ГОСТ 14192
	Беречь от влаги	ГОСТ 14192

2.4 Упаковка

1) Упаковка обеспечивает полную сохранность бинтов, защищает их от климатических воздействий, загрязнений, повреждения во время хранения и перевозки выбранным видом транспорта с учетом возможных перегрузок в пути.

2) Бинты в количестве 1 штука помещаются в индивидуальную упаковку: пакет из полипропилена, после чего открытые края пакета подвергаются термоконтактному свариванию.

3) Размеры индивидуальной упаковки – пакета из полипропилена – приведены в таблице 6.

3) Изделия, упакованные в индивидуальную упаковку: пакет из полипропилена, укладываются в транспортную тару по ГОСТ Р 52901 - короб из гофрированного картона и оклеиваются лентой полиэтиленовой с липким слоем ГОСТ 20477.

4) Размеры транспортной тары (ДхШхВ), см: (48х37х20), допустимое отклонение по каждому измерению $\pm 10\%$.

5) Количество изделий, упакованных в индивидуальную упаковку, помещаемых в единицу транспортной тары, приведено в таблице 7.

6) Масса брутто груза – медицинских изделий, помещенных в единицу транспортной тары, приведена в таблице 7.

Таблица 6 – Размеры индивидуальной упаковки

Линейный размер изделия		Размер индивидуальной упаковки, ДхШ, см	Линейный размер изделия		Размер индивидуальной упаковки, ДхШ, см
Длина, м	Ширина, см		Длина, м	Ширина, см	
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: вискоза					
3	8	15x11	4	8	15x12
3	10	17x11	4	10	17x12
3	12	19x11	4	12	19x12
3	15	21x11	4	15	21x12
3	20	25x11	4	20	25x12
3	25	30x11	4	25	30x12
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: полиэстер					
3	8	15x11	4	8	23x13
3	10	17x11	4	10	23x13
3	12	19x11	4	12	23x13
3	15	21x11	4	15	24x13
3	20	25x11	4	20	32x13
3	25	30x11	4	25	32x13
Допустимые отклонения:		±15 %	Допустимые отклонения:		±15 %

Таблица 7 – Количество изделий в единице транспортной тары. Масса брутто груза

Линейный размер изделия		Кол-во бинтов в единице транспортной тары, шт.	Масса брутто груза*, кг	Линейный размер изделия		Кол-во бинтов в единице транспортной тары, шт.	Масса брутто груза*, кг
Длина, м	Ширина, см			Длина, м	Ширина, см		
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: вискоза							
3	8	150	3,67	4	8	120	4,33
3	10	110	3,40	4	10	100	4,10
3	12	104	3,80	4	12	90	4,62
3	15	55	2,93	4	15	50	3,48
3	20	55	3,40	4	20	50	4,55
3	25	45	3,46	4	25	40	4,33
Бинт подкладочный медицинский под гипсовую повязку по ТУ 32.50.50-004-84441459-2023; материал: полиэстер							
3	8	150	3,33	4	8	120	3,50
3	10	110	3,07	4	10	100	3,63
3	12	104	3,30	4	12	90	3,90
3	15	55	2,40	4	15	50	2,83
3	20	55	2,96	4	20	50	3,63
3	25	45	3,00	4	25	40	3,63

* Допустимые отклонения: ±15%

2.5 Хранение

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя хранится при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

2.6 Транспортирование

1) Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

2) Условия транспортирования изделия – от минус 50 °С до плюс 50°С и относительной влажности до 100% при температуре плюс 25 °С.

2.7 Утилизация

Утилизацию изделия следует проводить согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684.

1) Изделия, не использованные по назначению, соответствуют классу медицинских отходов А.

2) Отходы класса А утилизируют как бытовые отходы.

3) Изделия, использованные по назначению, соответствуют классу медицинских отходов Б. В случае контакта с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изделия относят к классу В.

4) Отходы класса Б и В подлежат обеззараживанию физическим (паровым) или химическим методом (погружением в раствор дезинфицирующего средства).

5) Обеззараженные отходы утилизируют термическим способом централизованно.

6) При утилизации пользователям рекомендуется помещать изделие в отдельный пакет до централизованной утилизации уполномоченной организацией.

7) Индивидуальная упаковка изделия не требует специальной утилизации и утилизируется как бытовые отходы.

3 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

3.2 Гарантийный срок годности изделия – 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения, транспортирования и использования в соответствии инструкцией по применению.

4 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4.1 Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «СДТЛ» (ООО «СДТЛ»)

Адрес места нахождения: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 116/4

Номер телефона: +7 (961) 581-43-71

Адрес электронной почты: pharm88@bk.ru

4.2 Место производства

Общество с ограниченной ответственностью «СДТЛ» (ООО «СДТЛ»),

ООО «СДТЛ», 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 317 А.

5 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 41 листов.

Директор ООО «СДТЛ»
Татузов Р.А.

