

ООО «ЗУБНАЯ АРХИТЕКТУРА»



ООО «Зубная Архитектура»
195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт Шаумяна,
д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2
тел: (812) 449-90-01, 677-90-01
e-mail: zubrus@zubrus.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Зубная Архитектура»

П.С. Нечаев

«21» октября 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Материал стоматологический пломбировочный композитный, в вариантах исполнения (см. Приложение)

производства

Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.), Соединенное Королевство.

1. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: А1, в составе:
 - шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.



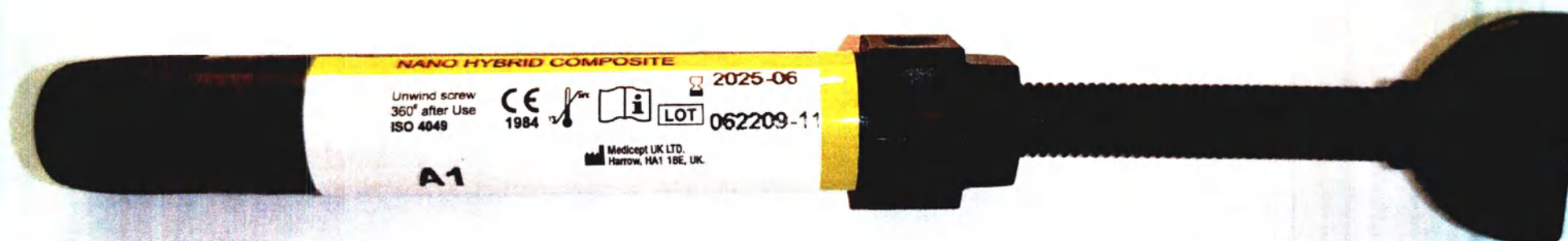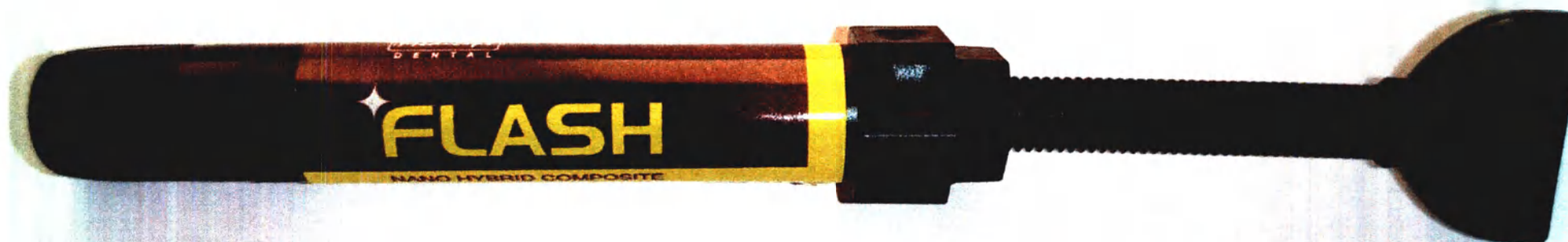

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

Medicept
DENTAL



MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

Dentin Flash Nano Hybrid Composite, apt. 3004,
оттенок: A1, в составе:

- шприц, 4 г - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 511, 2511, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01, E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № P 011811 от 18.05.2018

REF 3004 **LOT**



LOT
SHADE



2025-06
062209-11
A1

F 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: A1, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicapt UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT

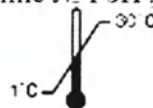


CE
1984



2. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: A2, в составе:
- шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.




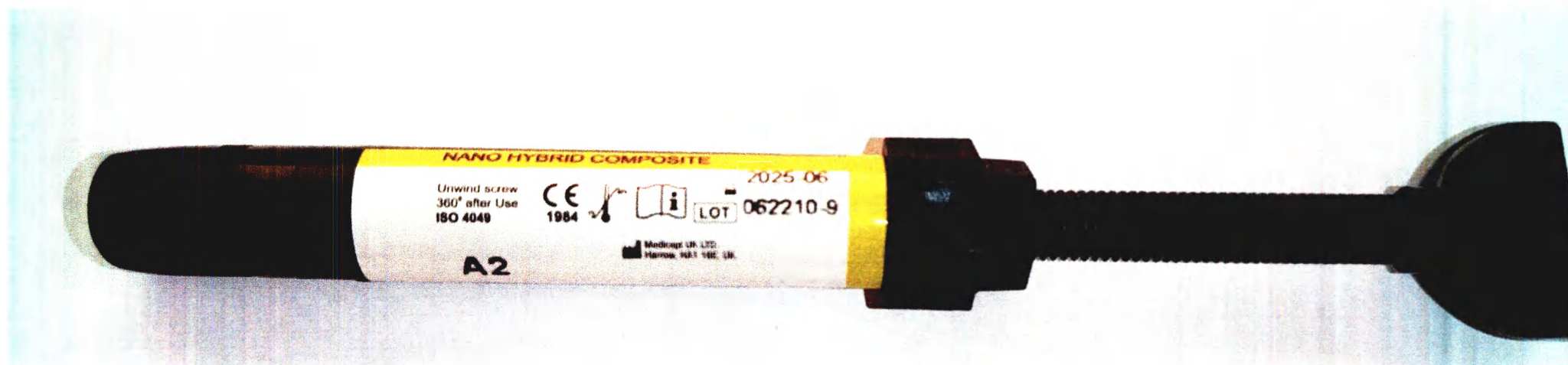

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

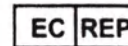

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain



MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

„Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: А2, в составе:

- шприц 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Medicent ЮКей. Лтд.).
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»-Е. Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр. кт. Паукова, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 9Н, 29Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449 90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № РНПА.01.ХХ.ХХ.ХХХХ

CE
1984



LOT
SHADE

2025-06
062210-9
A2

3004

IN UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: A2, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT

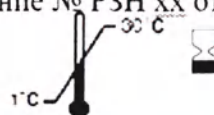

CE
1984 ^{1°C}




A2

4g

3. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: А3, в составе:
- шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.



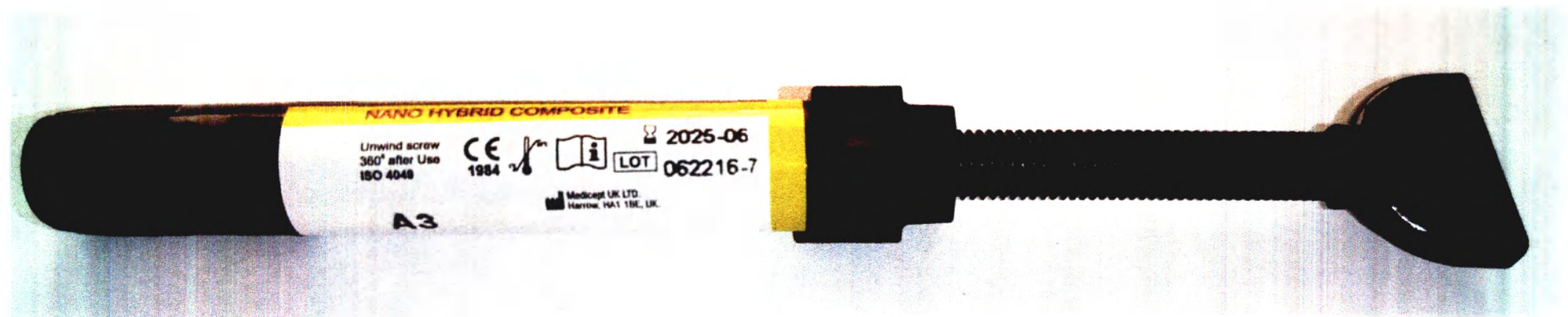

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38850
Santa Cruz de Tenerife, Spain

Mediccept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.medicceptdental.co.uk

REF 3004

 **MADE IN UNITED KINGDOM**

Dentium Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: А3, в составе:

- шприц, 4 г – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 **Mediccept UK Ltd.** (Mediccept ЮКей, Лтд.),
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») – Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел. – 7 (812) 449-90-01. E-mail: zubnaya.architecture.ru
Регистрационное удостоверение № Р В Д АХ от XX.XX.XXXX

REF 3004 **LOT** 




LOT
SHADE

2025-06
062216-7
A3

3004

IN UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: А3, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT

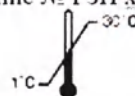


CE

CE
1984 1°



4. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: А3,5, в составе:
- шприц 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



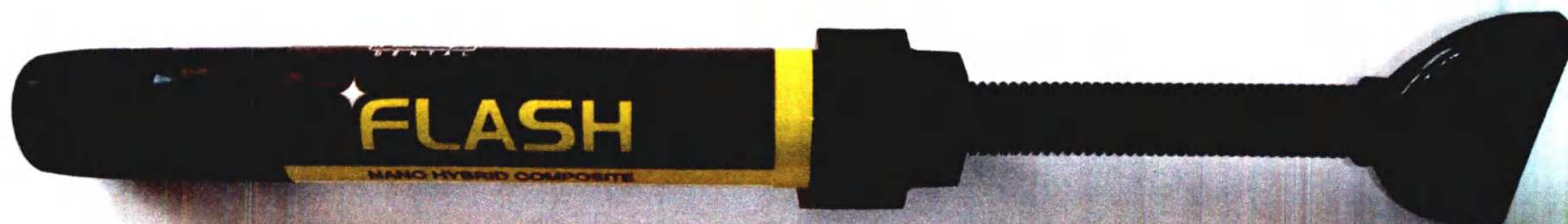

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: A3.5, в составе:

- шприц, 4 г - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Медицепт ЮКей, Лтд).
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр. кт. Шаумяна, д. 4, к. 1, Титер А., пом. 511, 2511, офис 2

Тел.: +7 (812) 449-90-01, E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН ХХ 01 ХХ ХХ ХХ ХХ

REF 3004

LOT

CE

CE
1984



LOT
SHADE

2025-06
062210-6
A3.5

F 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: А3,5, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей.Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.


Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT

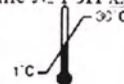


CE





5. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: В1, в составе:
- шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.



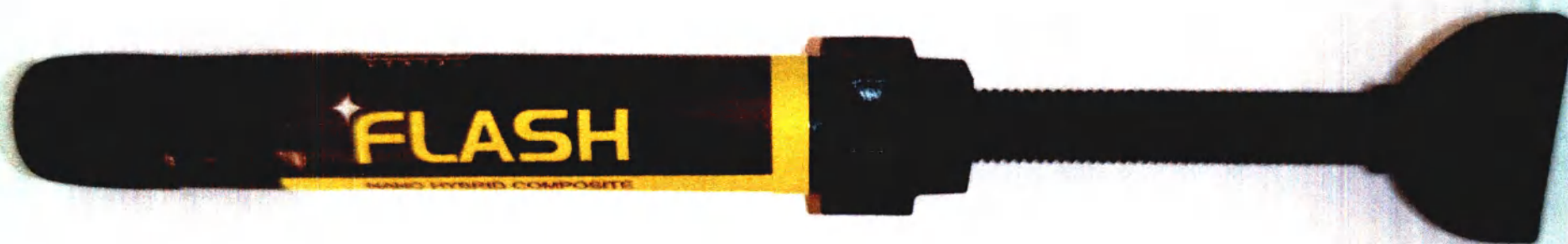

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049



Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain



MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

**„Dentium Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: B1, в составе:**

- шприц 4 г - 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Medicept ЮКей Лтд.),
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шахматова, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 511, 2511, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01, E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № P3H XX 01 XX.XX.XXXX

REF 3004 **LOT**

CE
1984



LOT
SHADE

2025-06
092113-11
B1

104

UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: B1, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex.
HA1 1BE, United Kingdom.



Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.


Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF

3004


LOT

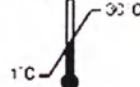

CE



CE
1984



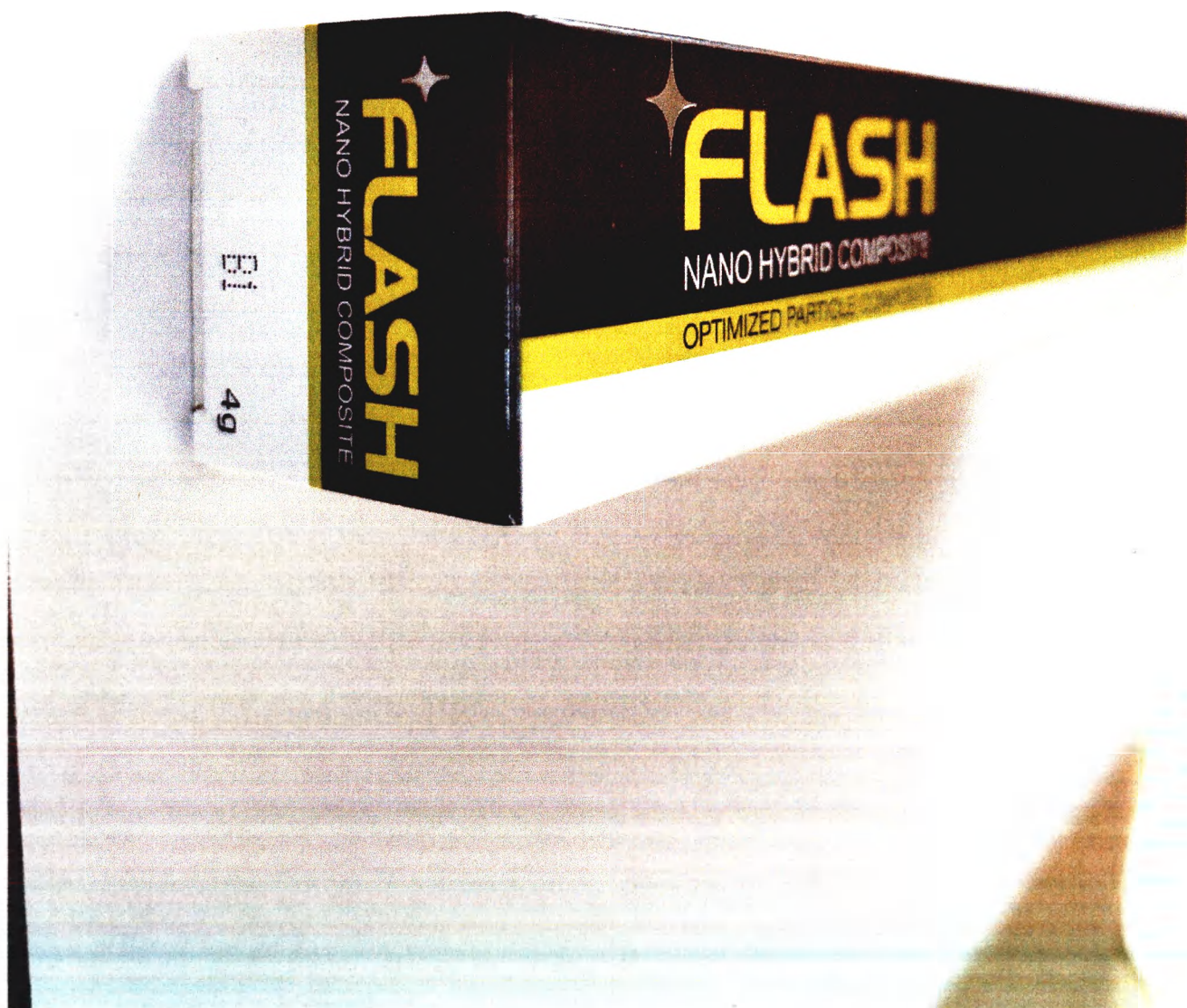

6. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: B2, в составе:
 - шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.



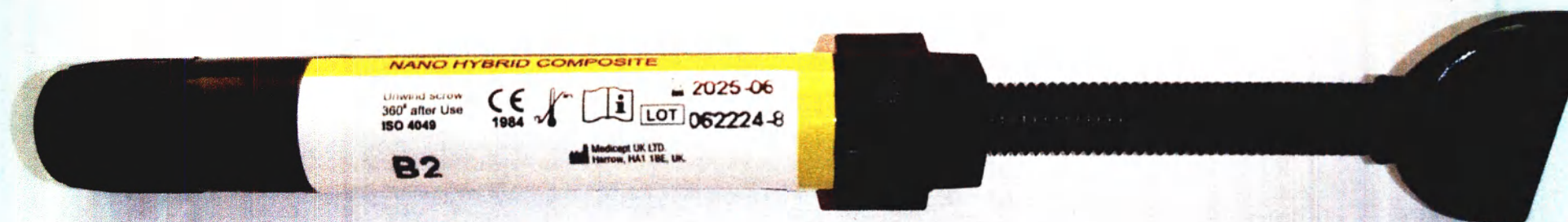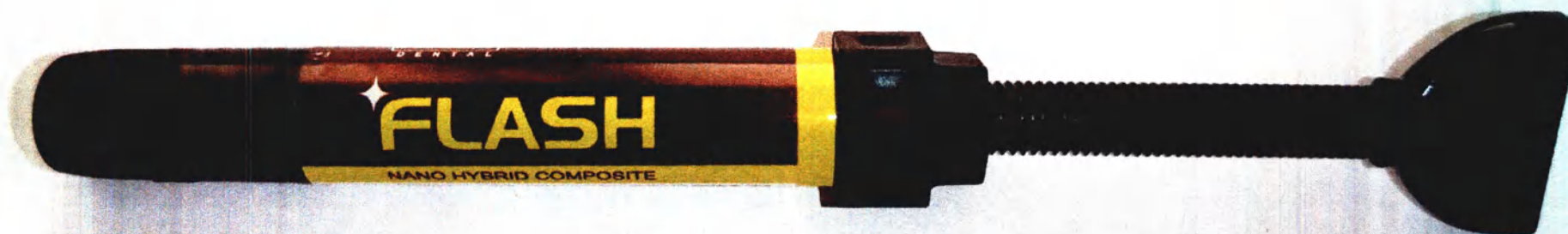

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
56 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

 **MADE IN UNITED KINGDOM**

Дентин Flash Nano Hybrid Composite, apr. 3004,
оттенок: B2, в составе:
шпатель, 4 г и 1 шт.
инструкция по применению 1 шт.
 **Medicept UK Ltd. (Medicent UK Ltd.)**
2nd Floor, Hygeia House, 56 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.
Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 511, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubus@zubus.ru
Регистрационное удостоверение № РН xx от xx.xx.xxxx
REF 3004 **LOT** 

CE
1984




LOT
SHADE

2025-06
062224-8
B2

REF 3004

 **MADE IN UNITED KINGDOM**

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: B2, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT



CE





4g

★ **FLASH**
NANO HYBRID COMPOSITE

B2

4g

7. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: ОА2, в составе:
- шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.



FLASH


A guide for using FLASH Optimized Particle Composite System

FLASH is a light cured resin based composite dental restorative which contains approximately 76% by weight (57% by volume) inorganic filler with an average particle size of 0.4 microns. All shades are radiopaque. FLASH represents years of research aimed at bridging the gap between microfill and hybrid composite materials. A proprietary, patent pending grinding process combined with sophisticated rheological modifiers allow FLASH to polish to a very high, long lasting luster similar to microfills, while providing strength equivalent to today's microhybrids. It is recommended that the composite be stored at ambient temperature. Shelf life of FLASH is 3 years from manufacture date. Expiration date is marked on syringes. Do not use



FLASH
NANO HYBRID COMPOSITE
OPTIMIZED PARTICLE COMPOSITE

4g

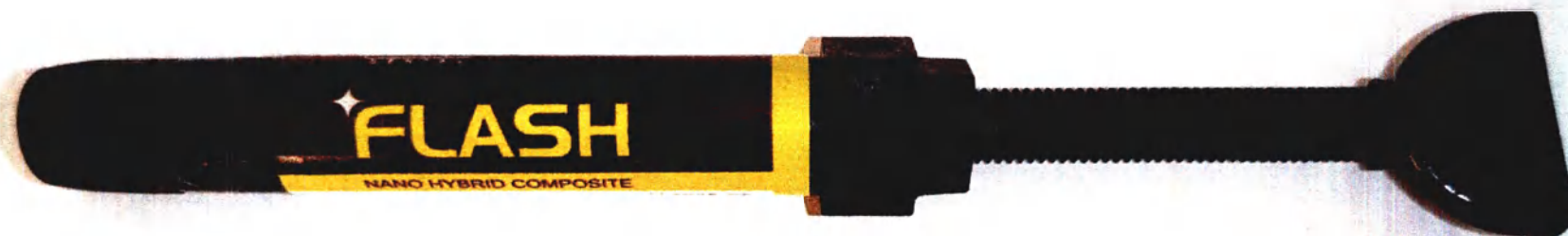

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

 **MADE IN UNITED KINGDOM**

**„Dentin Flash Nano Hybrid Composite, apr. 3004,
оттенок: ОА2, в составе:**

- ширина: 4 г - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

 **Medicept UK Ltd. (Medicent ЮКей. Лтд.)**
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») - Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шавырина, д. 4, к. 1, Интер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2
Тел.: +7 (812) 449-90-01, E-mail: zubrus.g.zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № P3H.xx.01.xx.xx.xxxx

REF 3004 **LOT** 



LOT

SHADE

2025-05
052203-21
0A2

] 3004

E IN UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: ОА2, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT

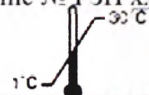

CE

CE
1984







8. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: ОА3, в составе:

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



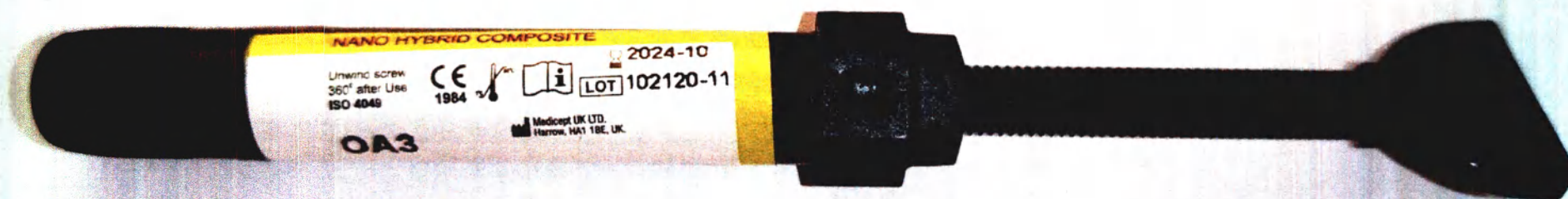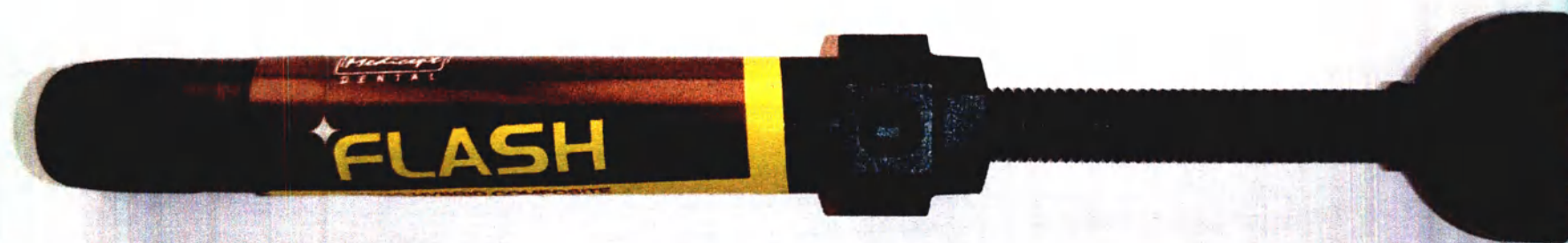

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

„Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: ОА3, в составе:

- шпатель 411 1 шт.;
- инструкция по применению 1 шт.

Medicept U.K Ltd. (Медисепт ЮКей, Гл.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») Россия, 194027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шахматный, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449 90 01. E-mail: zubusg@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № РИГ АА.01.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

REF 3004 LOT

CE

CE
1984



LOT

SHADE

2024-10
102120-11
0A3

EF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: ОА3, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН XX от XX.XX.XXXX

REF 3004

LOT

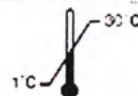

CE

CE
1984







9. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: BW, в составе:

- шприц, 4 г – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.



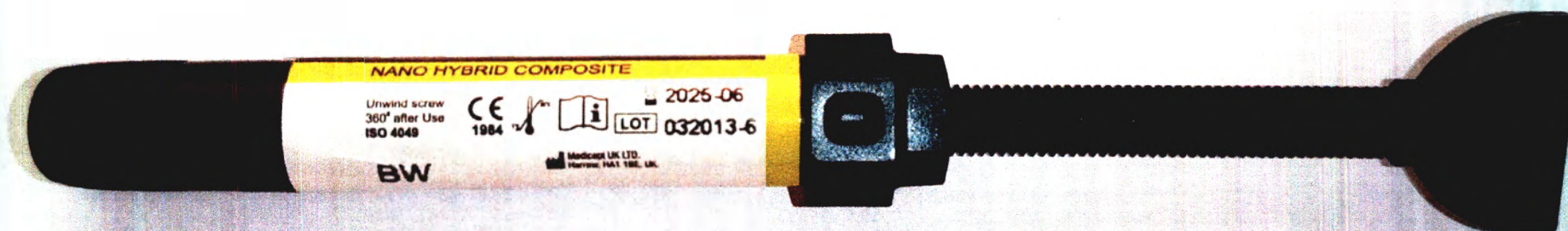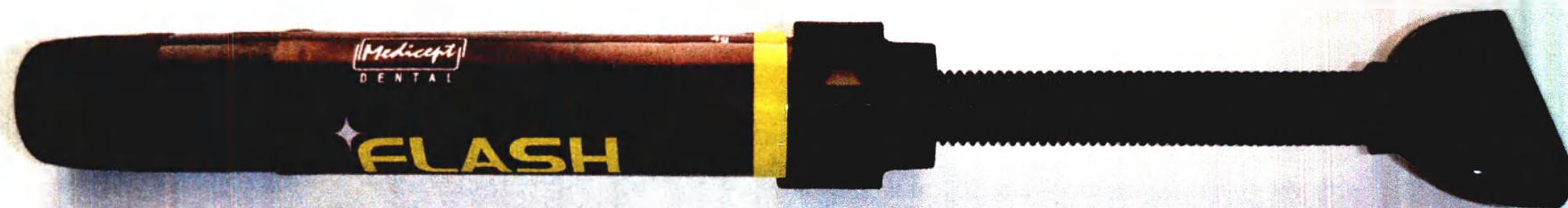

Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049



Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain



MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

Dentium Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: BW, в составе:

- шприц, 4 г - 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.),
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»), Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН ХА 01.ХХ.ХХ.ХХХХ

REF 3004 **LOT**

1984



LOT
SHADE

2025-06
032013-6
BW

004

UNITED KINGDOM

**Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: BW, в составе:**

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx


REF 3004

LOT

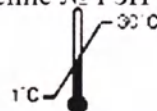



CE

CE
1984 1°C/

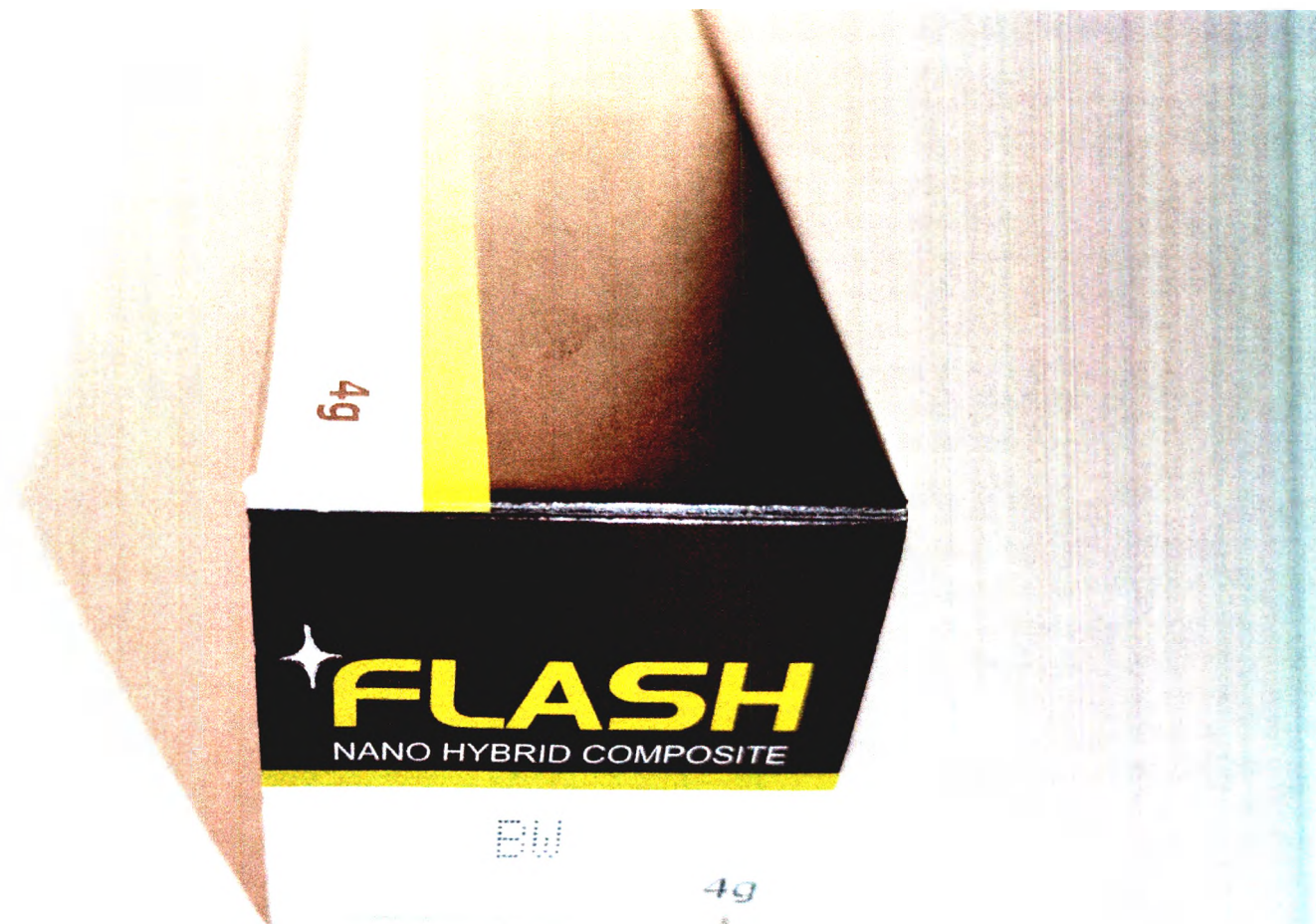

10. Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: INC, в составе:
 - шприц, 4 г – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.



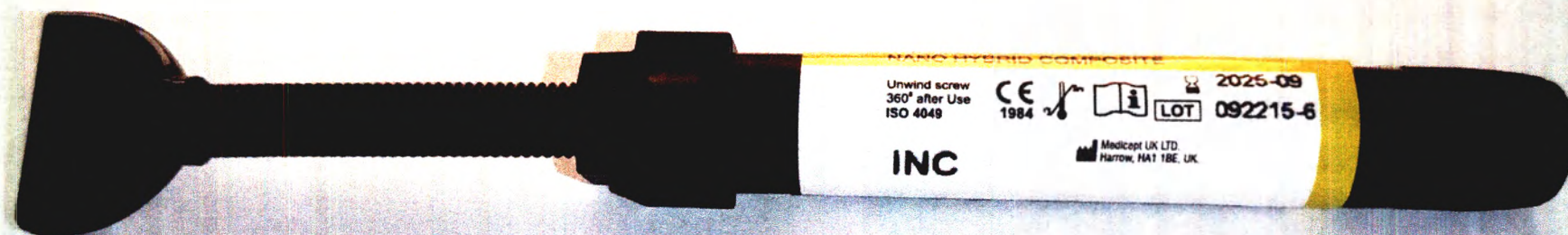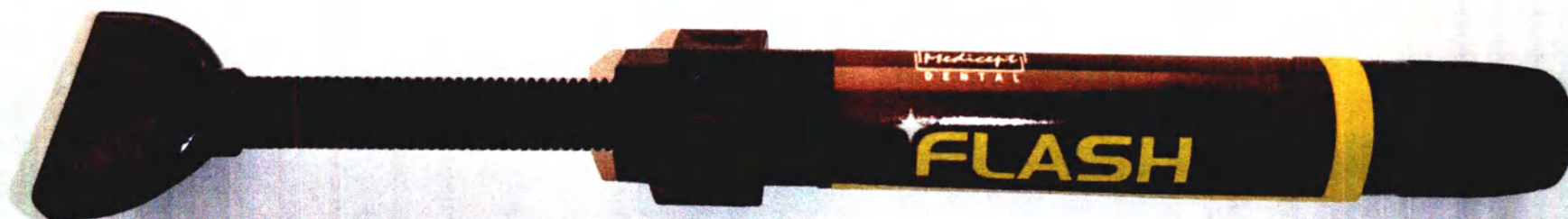


Contents :

- 1 x 4g Syringe
- Instruction Sheet

Unwind screw 360° after Use
ISO 4049



Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

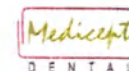

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3004

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: INC, в составе:

- шарик. 4 г. 1 шт.
- инструкция по применению 1 шт.

Medicept U.K Ltd. (Medicept UK Ltd.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № P-И XX-01 XX XX XXXX

REF 3004 **LOT**



LOT
SHADE

2025-09
092215-6
INC

] 3004

IE IN UNITED KINGDOM

Дентин Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004,
оттенок: INC, в составе:

- шприц, 4 г – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1. Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3004

LOT

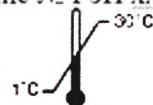

CE

CE
1984 1°C





INC


4g

11. Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005, оттенок: A1, в составе:

- шприц, 2 г – 1 шт.;
- канюля – до 5 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



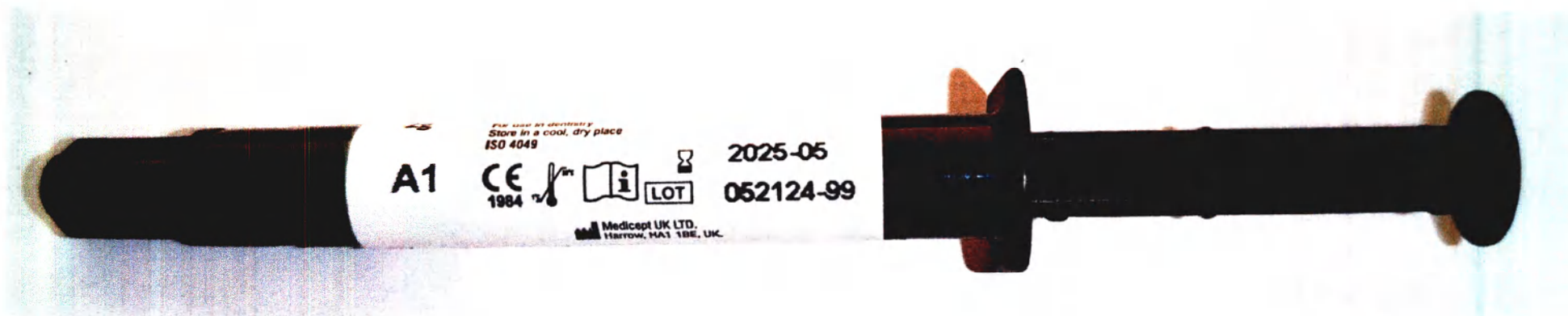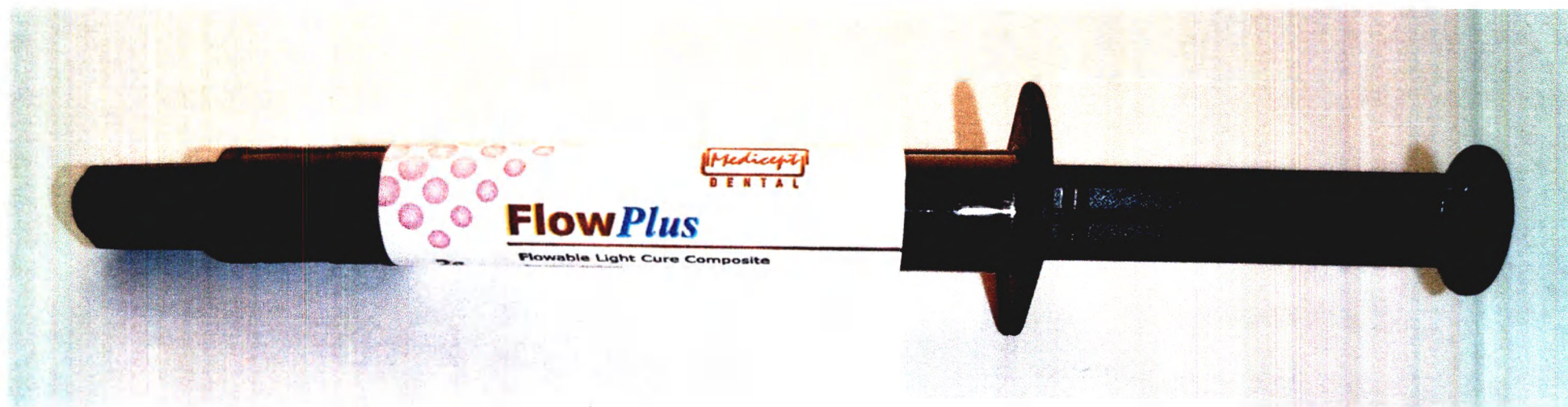

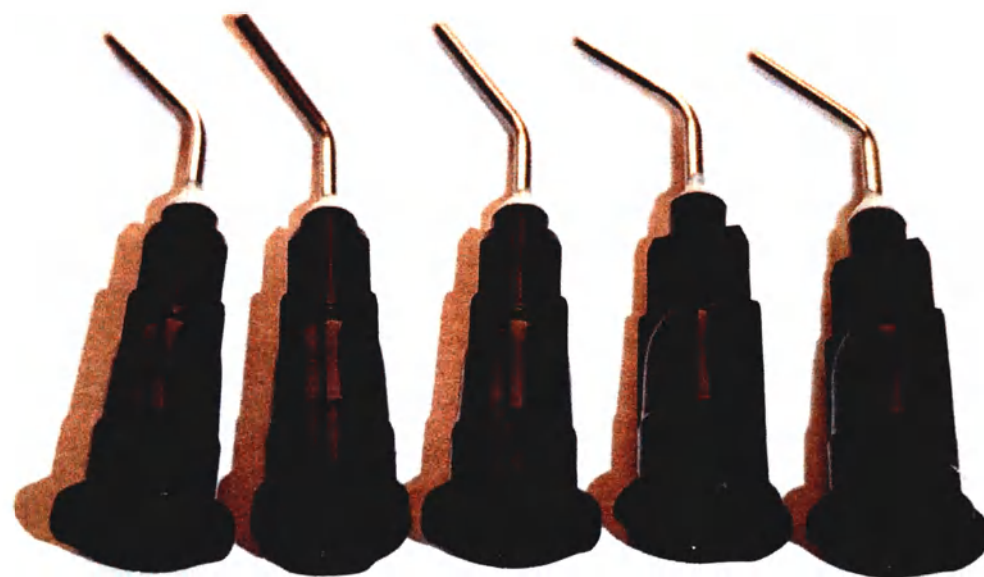

Contents :

- 1 x 2g Syringes
- Instruction Sheet
- 5 Micro Tips

For use in dentistry
Store in a cool, dry place
ISO 4049

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: A1, в составе:

- шпатель 2 шт. - 1 шт.
- катетер - 30 5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Medicent ЮКей. Т.Л.Д.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2,
Тел.: +7 (812) 449-90-01 E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № РН АА.01.АХ.55.5555

REF 3005 LOT

CE

CE
1984



LOT

2025-05
052124-99

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38850
Santa Cruz de Tenerife, Spain

REF 3005

 **MADE IN UNITED KINGDOM**

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: A1, в составе:

- шприц, 2 г – 1 шт.;
- канюля – до 5 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.




Medicent UK Ltd. (Медисент ЮКей Лтд.).
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx

REF 3005 **LOT**

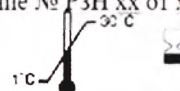


CE

CE
1984



EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Av
Los Cristianos, Av
Santa Cruz de Ter

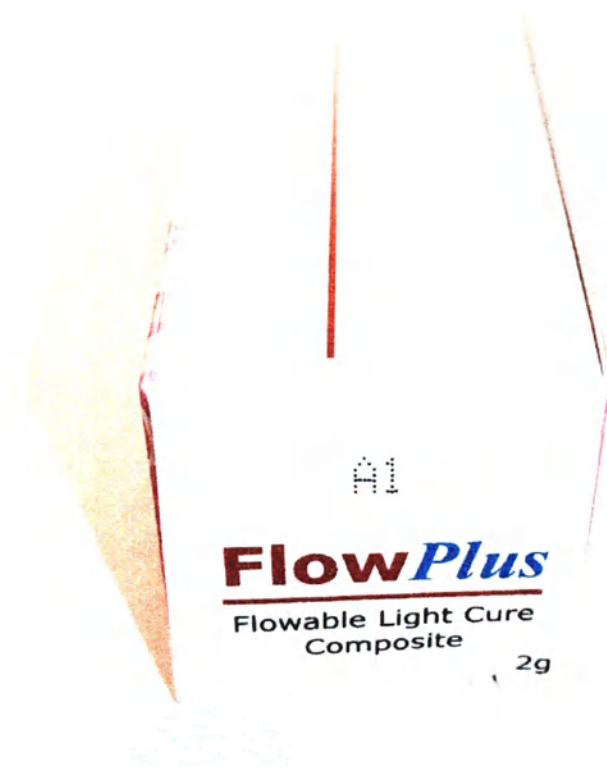

12. Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005, оттенок: A2, в составе:
- шприц, 2 г – 1 шт.;
 - канюля – до 5 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.

2g

Flow Plus

Flowable Light Cure Composite




FLOW PLUS DIRECTIONS FOR USE:

A flowable light cure hybrid resin restorative suitable for Class III, Class IV, and Class V restorations
 FLOW PLUS is a flowable light cure hybrid resin restorative suitable for Class III, Class IV, and Class V restorations. Additional functions include: repair of enamel defects, repair of porcelain restorations, minor occlusal build-ups in non-stress bearing areas, pit and fissure sealant, cement for ceramic/composite veneers, incisal abrasions, and core build-ups. This unique composite which incorporates BIS-GMA chemistry along with a proprietary glass filler (approximately 60%) yields a flowable non-slumping restorative material





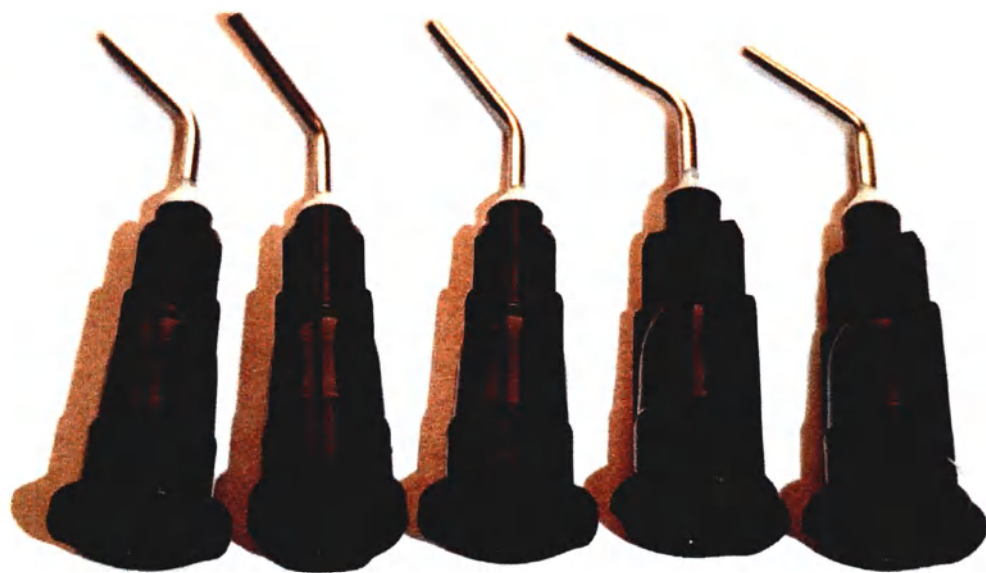

Contents :

- 1 x 2g Syringes
- Instruction Sheet
- 5 Micro Tips

For use in dentistry
Store in a cool, dry place
ISO 4049

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: A2, в составе:

- шприц, 2 г – 1 шт.,
капюль – до 5 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

Medicept U.K Ltd. (Meducent ЮКей. Лтд.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура» – Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Интер-А. пом. 511, 2511, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubaia@zubaia.ru
Регистрационное удостоверение № ПРН AN.01.XX.AS.XXXX

REF 3005 LOT

CE

CE
1984



LOT

2025-07
072201-85

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

REF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: А2, в составе:

- шприц 21 – 1 шт.;
- капсюль до 5 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicert UK Ltd. (Медисерт ЮКей Лтд).
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр.кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 511, 2511, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН XX от XX.XX.XXXX

REF

3005

LOT

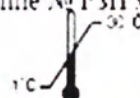

CE

CE
1984



EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, A
Los Cristianos, I
Santa Cruz de Te

A2

FlowPlus

Flowable Light Cure
Composite

2g

13. Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005, оттенок: А3, в составе:
- шприц, 2 г – 1 шт.;
 - канола – до 5 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.

2g

FlowPlus


Flowable Light Cure Composite

Medicept™
DENTAL

FLOW PLUS
DIRECTIONS FOR USE:

A flowable light cure hybrid resin restorative suitable for Class III, Class IV, and Class V restorations
FLOW PLUS is a flowable light cure hybrid resin restorative suitable for Class III, Class IV, and Class V restorations. Additional functions include: repair of enamel defects, repair of porcelain restorations, minor occlusal build-ups in non-stress bearing areas, pit and fissure sealant, cement for ceramic/composite veneers, incisal abrasions, and core build-ups. This unique composite which incorporates BIS-GMA chemistry along with a proprietary glass filler (approximately 60%) yields a flowable non-slumping restorative material



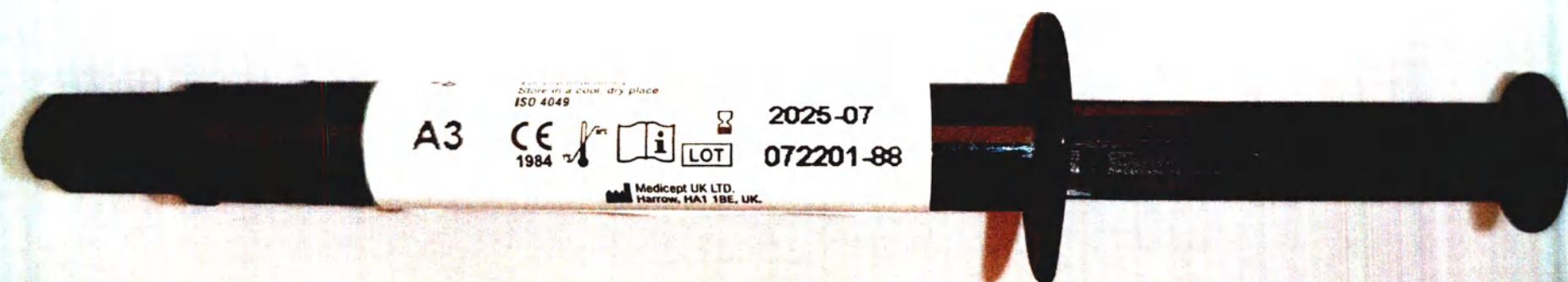

Contents :

- 1 x 2g Syringes
- Instruction Sheet
- 5 Micro Tips

For use in dentistry
Store in a cool, dry place
ISO 4049

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, apr. 3005,
оттенок: А3, в составе:

- ширина: 24 – 1 шт.
- капсюль – до 5 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Medicent ЮКей. Лтд.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») – Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр. кт. Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01 E-mail: zubrus@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН ХХ.01.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ

REF 3005 LOT

CE

CE
1984



LOT

2025-07
072201-88

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

3005

UNITED KINGDOM

**Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: А3, в составе:**

- шприц, 2 г – 1 шт.;
- канюля – до 5 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.).
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.


Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx 01 xx.xx.xxxx

REF 3005

LOT

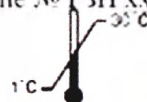

CE

CE
1984



EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave J
Los Cristianos, Aron
Santa Cruz de Teneri

A3

FlowPlus

Flowable Light Cure
Composite

2g

14. Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005, оттенок: А3,5, в составе:
- шприц, 2 г – 1 шт.;
 - канюля – до 5 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.







Contents :


- 1 x 2g Syringes
- Instruction Sheet
- 5 Micro Tips

For use in dentistry
Store in a cool, dry place
ISO 4049

Medicept
DENTAL



MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

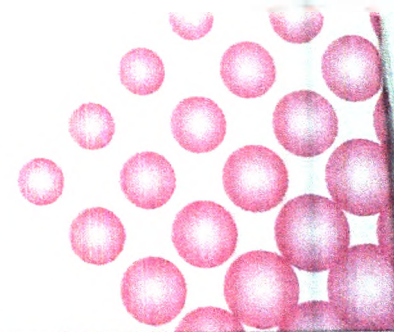

REF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: А3.5, в составе:

- ширина: 21 - 1 шт.
- канюля: до 5 шт.
- инструкция по применению: 1 шт.

Medicept UK Ltd. (Medicent UK Ltd.)
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») - Россия, 195027 г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаймиева, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2
Тел: +7 (812) 449-90-01 E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № ПЗН XX.01.XX.XX.XXXX

REF 3005

LOT



CE

CE
1984




LOT

2025-01
121903-80

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

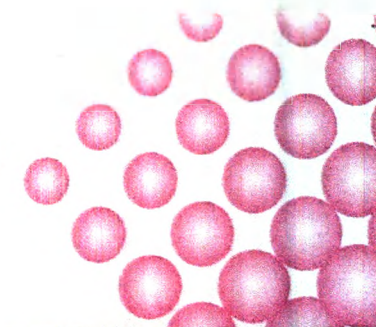

EF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: А3,5, в составе:

- шпатель 21 – 1 шт.,
- кисточка – до 5 шт.,
- инструкция по применению – 1 шт.

 **Medicert UK Ltd. (Медисерт ЮКей Лтд.),**
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BF, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2,
Тел.: +7 (812) 449-90-01, E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН xx от xx.xx.xxxx


REF

3005

LOT

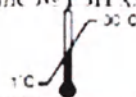

CE
1984

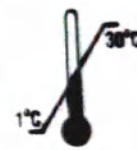

EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Juan
Los Cristianos, Arona, 38
Santa Cruz de Tenerife, S

CE

A3.5

FlowPlus

Flowable Light Cure
Composite

2g

15. Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005, оттенок: B2, в составе:

- шприц, 2 г – 1 шт.;
- канюля – до 5 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.







Contents :

- 1 x 2g Syringes
- Instruction Sheet
- 5 Micro Tips

For use in dentistry
Store in a cool, dry place
ISO 4049

Medicept
DENTAL

MEDICEPT UK LTD.
2nd Floor, Hygeia House,
66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom
www.mediceptdental.co.uk

REF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

Лепилно текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: B2, в составе:

- шприц, 2 г - 1 шт.
 - канюля - до 5 шт.
 - инструкция по применению - 1 шт.
- Medicept U.K Ltd. (Medicent UK Ltd.)**
2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom

Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура») - Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 511, 25Н, офис 2
Тел.: +7 (812) 449-90-01. E-mail: zubrus.d@zubrus.ru
Регистрационное удостоверение № PCH XX от XX.XX.XXXX

REF 3005

LOT

CE

CE
1984



LOT

2025-01
091926-84

EC REP

Stephen Rowe
Cristomar E4-1, Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

EF 3005

MADE IN UNITED KINGDOM

**Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005,
оттенок: B2, в составе:**

- шпатель 2 шт. – 1 шт.;
- кисточка – до 5 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.



Medicapt UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.).

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex,
HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»
(ООО «Зубная Архитектура»). Россия, 195027, г. Санкт Петербург,

пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: 7 (812) 449 90 01. E-mail: zubrus@zubrus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН XX от XX.XX.XXXX

REF

3005

LOT



CE

CE
1984



EC REP

Stephen Rowe
Cristimar E4-1, Ave Ju
Los Cristianos, Arona
Santa Cruz de Tenerife

B2

FlowPlus

Flowable Light Cure
Composite

2g

Транспортная упаковка.

Medicept
D E N T A L

Материал стоматологически и биомиметичен композицион, в вариантах использования:

Iceumini Flash Nano Hybrid Composite, арт. 3004, оттенок: А1, в составе:
- опрощ, 4 г - 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.
РУ № РИХАХ 01 АХАХАХАХ

Код, -во: №№ уш.

Medicept UK Ltd. (Медисепт ЮКей), Ltd., 2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex, HA1 1BE, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура» (ООО «Зубная Архитектура»), Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, интер. т. муниципальный округ Бюваля Охта, пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Интер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2. Тел.: +7 (812) 449-90-01 E-mail: office@zubnaya.ru



RELINING
MATERIAL
ROOT CANAL
INSTRUMENTS

RESTORATIVE AND
FILLING MATERIAL

CROWN &
BRIDGE
MATERIAL

FINISHING
AND
POLISHING

IMPRESSION
MATERIAL

BONDING
ADHESIVE
& ETCHANT

Medicept DENTAL



Материал состоит из органических и полимеризованных компонентов, в различных количествах.

Leucium ниссман Flow Plus Light Cure Composite, арт. 3005, оттенок: А1, в комплекте:
- шпатель, 2 шт.
- катетер, 1 шт.
- инструкция по применению. Упаковка: 1 шт.
PS: № PBA00000000000000000000

Код: 000-00000000000000000000

Medicept UK Ltd (Medicept) 10 Kent, 1st & 2nd Floor, Hygeia House, 96 College Road, Harrow, Middlesex, HA1 1BL, United Kingdom.

Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура» (ООО «Зубная Архитектура»), Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, м.тер. г. муниципальный округ Большая Охта, пр. Шашкова, д. 4 к. 1, Интер-А, пом. 5Н, 25Н, офис 2. Тел: +7 (812) 449-96-01. E-mail: info@zab-arch.ru





FRAGILE



KEEP DRY



THIS SIDE UP



HANDLE WITH CARE



Medicept UK Ltd.

2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow,
Middlesex, HA1 1BE, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1923 251327 • Fax: +44 (0) 1923 251334

Email: info@mediceptdental.co.uk • www.mediceptdental.co.uk



Medicept™

www.mediceptdental.com

Medicept™

Прошнуровано, пронумеровано
Количество 84 лист⁹

Генеральный директор
ООО "Зубная Архитектура"
Нечаев П.С.

