


ОКПД2 21.20.24.133

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ОмниМедика»

 /Шуваева О.А./
« 6 » августа 2024 г.

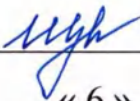

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Версия 3.0**

**Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по
ТУ 21.20.24-001-26350513-2022**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ОмниМедика»
129343, Москва г, Серебрякова проезд, дом № 6, этаж 5, пом.7-9

Москва,
2024 г.

Введение

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и указаниями по применению. Несоблюдение или нарушение настоящей Инструкцией по применению ведет к аннулированию гарантии и может представлять опасность для пациента. Перед применением проверьте комплектность и целостность продукта и упаковки. Не используйте продукт в случае сомнений в его комплектности и (или) целостности.

Назначение и область применения

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый, предназначен для оборачивания вокруг части тела для фиксации изделия (например, кожной повязки, катетера, канюли) на коже пациента без наклеивания или надавливания на тело (далее по тексту – бинт, бинты).

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, медицинские организации, домашнее использование.

Потенциальные пользователи: медицинский персонал, пациенты имеющие показания к применению.

Показания: для фиксации повязок всех типов, фиксации изделий (например, катетера, канюли) на частях тела имеющих коническую или округлую форму.

Противопоказания: индивидуальные местные аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие.

Меры предосторожности: не использовать в качестве повязки на раневую поверхность.

Возможные осложнения: при слишком тугом наложении бинта, затрудняющим отток крови, конечность вскоре отекает и становится синюшной. Могут появиться боли, а затем онемение конечности.

Комплектность

Бинт медицинский нестерильный, одноразовый по ТУ 21.20.24–001–26350513–2022,

1. Варианты исполнения:

1. Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 5 см х 4,5 м, артикул 300001 – 1 шт./уп.;

2. Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 4,5 м, артикул 300002 – 1 шт./уп.;

3. Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 10 см х 4,5 м, артикул 300003 – 1 шт./уп.;

4. Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 15 см х 4,5 м, артикул 300004 – 1 шт./уп.;

5. Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 4,5 м, артикул 300005 – 20 шт./уп.;

6. Бинт креповый ОМНИКРЕП®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 10 см х 4,5 м, артикул 300006 – 20 шт./уп.;

7. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 2,5 см х 4,5 м, артикул 400501 – 1 шт./уп.;

8. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®, размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 5 см х 4,5 м, артикул 400502 – 1 шт./уп.;

9. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 4,5 м, артикул 400503 – 1 шт./уп.;

10. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 5 см х 20 м, артикул 400507 – 1 шт./уп.;

11. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 20 м, артикул 400508 – 1 шт./уп.;

12. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 10 см х 20 м, артикул 400509 – 1 шт./уп.;

13. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 5 см х 20 м, артикул 400504 – 6 шт./уп.;

14. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 7,5 см х 20 м, артикул 400505 – 6 шт./уп.;

15. Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ[®], размер Ш×Д (длина в растянутом состоянии): 10 см х 20 м, артикул 400506 – 6 шт./уп.

II. Инструкция по применению – 1 шт./уп.

Технические характеристики

По классификации ГОСТ 31508 и Приказа МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (с изменениями от 25.09.2014 г.) бинты относятся к неинвазивным медицинским изделиям степени потенциального риска применения 1. Вид медицинского изделия: 116430. Вид контакта медицинского изделия по ГОСТ ISO 10993-1 – кратковременный контакт (до 24 часов) с поверхностью неповрежденной кожи.

Бинты производятся ленточными, выпускаются нестерильными и предназначены для однократного применения.

Бинты изготавливаются:

- креповые (требующие дополнительного закрепления);
- когезивные (самофиксирующиеся).

Бинты производятся следующих размеров:

Исполнение	Артикул	Размер	Количество единиц в потребительской упаковке
Бинт креповый ОМНИКРЕП [®]	300001	5 см х 2,25 м	1 шт.
Бинт креповый ОМНИКРЕП [®]	300002	7,5 см х 2,25 м	1 шт.
Бинт креповый ОМНИКРЕП [®]	300003	10 см х 2,25 м	1 шт.
Бинт креповый ОМНИКРЕП [®]	300004	15 см х 2,25 м	1 шт.
Бинт креповый ОМНИКРЕП [®]	300005	7,5 см х 2,25 м	20 шт.
Бинт креповый ОМНИКРЕП [®]	300006	10 см х 2,25 м	20 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ [®]	400501	2,5 см х 3 м	1 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ [®]	400502	5 см х 3 м	1 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ [®]	400503	7,5 см х 3 м	1 шт.

Исполнение	Артикул	Размер	Количество единиц в потребительской упаковке
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	400504	5 см х 13 м	6 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	400505	7,5 см х 13 м	6 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	400506	10 см х 13 м	6 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	400507	5 см х 13 м	1 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	400508	7,5 см х 13 м	1 шт.
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	400509	10 см х 13 м	1 шт.

Бинты когезивные изготавливаются цвета кожи.

Бинты креповые изготавливаются белыми.

Примечание - Для изготовления бинтов креповый ОМНИКРЕП® красители не применяются, так как белый цвет бинтов креповых ОМНИКРЕП® обусловлен естественным натуральным цветом материалов, из которых изготовлены бинты креповые ОМНИКРЕП®: хлопок и спандекс, имеют натуральный цвет – белый.

Предельные отклонения размеров бинтов не должны превышать:

- по ширине и по длине в нерастянутом состоянии $\pm 10\%$.

Эксплуатационно-технические характеристики бинтов должны соответствовать таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование изделия	Растяжимость, %	Поверхностная плотность, г/м	Разрывная нагрузка (прочность при разрыве), Н (кгс)	Когезионная прочность расслаивания, Н/м
Когезивные (самофиксирующиеся) ОМНИБИНТ®	От 10 до 160 включ.	От 40 до 120 включ.	Не менее 117,6 (12)	От 15 до 70 включ.
Креповые ОМНИКРЕП®	От 10 до 160 включ.	От 120 до 300 включ.	Не менее 117,6 (12)	—

Примечание: Бинты креповые ОМНИКРЕП® артикулов 300001, 300002, 300003, 300004, 300005, 300006 и Бинты когезивные (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ® артикулов 400501, 400502, 400503 имеют длину при растяжении 4,5 м. Бинты когезивные (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ® артикулов 400504, 400505, 400506, 400507, 400508, 400509 имеют длину при растяжении 20 м.

Кривизна ленточных бинтов не должна превышать (30 ± 1) мм на 1 м длины.

Значение разрывного удлинения бинтов должно быть не менее значения растяжимости.

Полотно бинтов не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически повреждённых волокон.

Поверхность бинтов должна быть без видимых дефектов, разрывов (надрывов), отверстий, пятен, складок, загрязнений, посторонних включений. Швы в бинтах не допускаются. Кромка должна быть ровной.

При оценке качества на 3 м бинта допускается не более двух дефектов, в т. ч:

- один продольный (белизны в одну нить или утолщенные нити основы не более 2-кратной толщины нити) в общей сложности не более 20 см;
- один поперечный по всей ширине бинта (утолщенные нити утка не более 2-кратной толщины нити или забоины и недосеки не более 2 мм).

В части стойкости к действию внешних механических факторов бинты должны соответствовать следующим параметрам:

- вибрационные нагрузки: Диапазон частот 10-55 Гц, амплитуда перемещения 0,35 мм.
- ударные нагрузки: Пиковое ударное ускорение 100 мс^{-2} , длительность действия ударного ускорения 16 мс.

Масса бинтов:

Исполнение	Размер	Масса
Бинт креповый ОМНИКРЕП®	5 см x 2,25 м	$16,88 \pm 2 \text{ г}$
Бинт креповый ОМНИКРЕП®	7,5 см x 2,25 м	$23,31 \text{ г} \pm 3 \text{ г}$
Бинт креповый ОМНИКРЕП®	10 см x 2,25 м	$33,75 \pm 4 \text{ г}$
Бинт креповый ОМНИКРЕП®	15 см x 2,25 м	$50,6 \pm 5 \text{ г}$
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	2,5 см x 3 м	$8,4 \pm 3 \text{ г}$
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	5 см x 3 м	$16,9 \pm 3 \text{ г}$
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	7,5 см x 3 м	$25,3 \pm 4 \text{ г}$
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	5 см x 13 м	$75 \pm 8 \text{ г}$
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	7,5 см x 13 м	$112,5 \pm 12 \text{ г}$
Бинт когезивный (самофиксирующийся) ОМНИБИНТ®	10 см x 13 м	$148,5 \pm 15 \text{ г}$

Бинты изготавливаются из следующих материалов:

- Бинты когезивные изготавливаются из полотна нетканного материала (95% полипропилен + 5% спандекс), марка «Nanjing 3H», производитель «Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd», Китай. Марка окрашивающего вещества: Цвет кожи (Skin color), производство Anji Hongde Medical Products Co., Ltd.

Примечание – Для получения нетканого полотна телесного цвета перед началом производства в полипропилен добавляют цветную маточную смесь (colored masterbatch), которая также является полипропиленом.

- Бинты креповые изготавливаются из полотна, состоящего из 80% хлопка, марка «Linfeng», производитель «Xuzhou Linfeng Textile Co., LTD», Китай, и 20% спандекса, марка «Chiyu», производитель «Ninghai Chi Yu Textile Co., LTD (Haining Chi Yu Textile Co., LTD)», Китай.

Не содержит натуральный каучук (латекс).

Указания по применению

Бинты должны быть использованы сразу после вскрытия упаковки.

Накладывать бинты следует только на чистую и сухую кожу, избегая их чрезмерного натяжения (растягивания), чтобы не стягивать конечность или не мешать кровообращению. Не допускается наносить бинты на открытые раны.


Не использовать повторно. Утилизировать после использования.

Условия эксплуатации


Бинты пригодны для эксплуатации в условиях У климата по ГОСТ 15150 категории размещения 1.1, при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С, относительной влажности не выше 98% при температуре плюс 25 °С и атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа.

Способ применения, способы закрепления креповых бинтов:

Бинтование следует проводить от периферии к центру, рука или нога бинтуются снизу-вверх. Бинтовать следует начинать с наиболее узкого места, переходя к более широкому. Первые обороты бинта накладываются один на другой. При бинтовании всегда располагайте головку бинта сверху. Каждый последующий оборот бинта накладывается в косом направлении и должен покрывать предыдущий на половину или две трети, закрепляя его. Разравнивайте каждый тур – складки ткани могут сдавливать кровеносные сосуды. Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки. Свободный конец бинта должен составлять прямой угол с рукой, в которой находится рулон бинта. Бинт нужно натягивать равномерно. Повязка не должна быть очень свободной и съезжать по поверхности тела, но и не должна быть очень тугой и сдавливать с излишней силой перевязанное место, нарушая кровообращение.

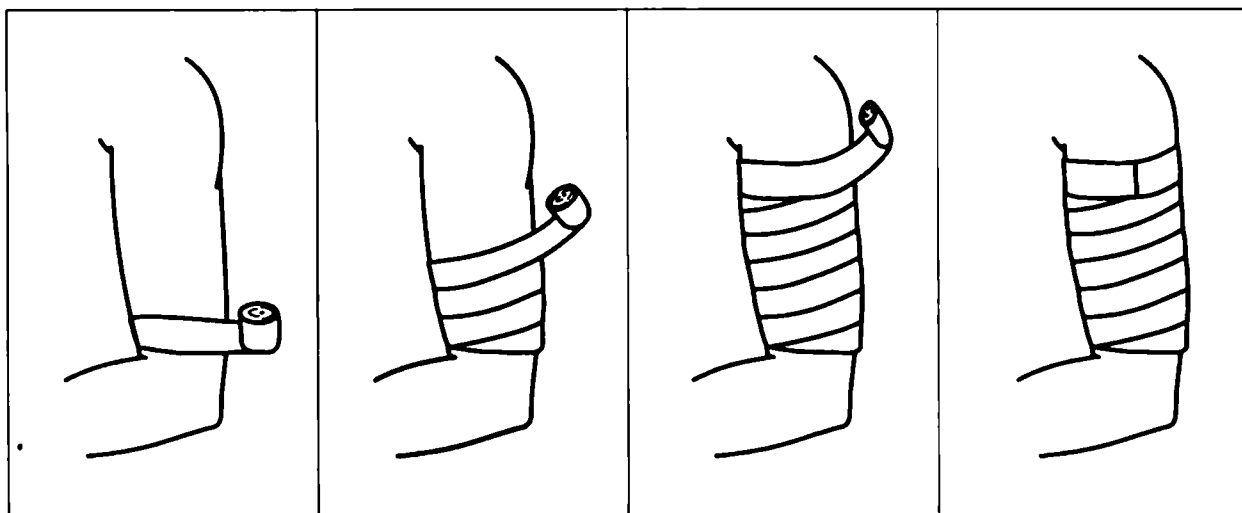

Конец крепового бинта ОМНИКРЕП® следует закрепить с помощью обычной булавки (не подлежит обязательной сертификации, не поставляется совместно с изделием, необходимо приобретать отдельно) или без дополнительных крепежных приспособлений свободным краем бинта под забинтованную часть.

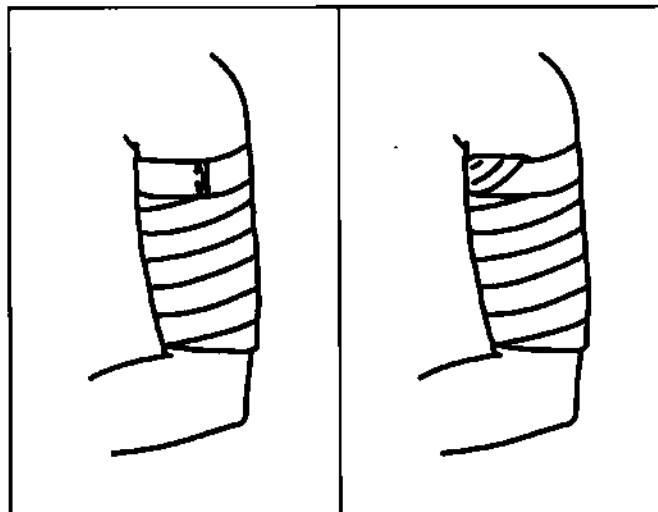

Маркировка

Символы маркировки – по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка потребительской и групповой упаковки должна содержать:

- наименование медицинского изделия;
- наименование производителя (изготовителя) и (или) его логотип, и (или) его товарный знак;
- адрес производителя (изготовителя);
- адрес места производства;
- обозначение бинтов по настоящим техническим условиям;
- размер;
- количество;
- номер партии;
- дата изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- информация об одноразовом использовании;
- условия хранения;
- указания по утилизации;
- показания к применению;
- противопоказания;
- способ применения;
- фразу «Изделие не является стерильным. Не допускается наносить бинт на открытые раны. Не содержит латекс.»;
- фразу «Состав: 80% хлопок, 20% спандекс.» для бинтов креповых ОМНИКРЕП® или «Состав: 95% полипропилен, 5% спандекс.» для бинтов когезивных (самофиксирующихся) ОМНИБИНТ®;
- Символы:
 - «Не использовать при повреждении упаковки»;

- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- «Дата изготовления»;
- «Использовать до»;
- «Номер партии»;
- «Петля Мебиуса: код переработки по типу материала: 21 PAP – Прочий картон»;
- «Бинт»;
- «Отсутствие латекса» (для бинтов когезивных);
- «Хлопок» (для бинтов креповых);
- штрих-код (штриховой код);
- номер и дата регистрационного удостоверения.

Данные наносятся типографским способом, штампованием или любым другим пригодным способом на потребительскую или групповую упаковку.

Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименование медицинского изделия;
- наименование производителя (изготовителя) и (или) его логотип, и (или) его товарный знак;
- адрес производителя (изготовителя);
- обозначение бинтов по настоящим техническим условиям;
- размер;
- количество;
- условия хранения;
- условия транспортирования;
- Символы:
 - «Беречь от влаги».

Расшифровка символов информации по транспортировке, хранению и использованию указана в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

	Не использовать при повреждении упаковки
	Беречь от влаги
	Запрет на повторное применение
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления

	Использовать до
	Не допускать воздействия солнечного света
	Номер партии
	Петля Мебиуса: код переработки по типу материала: 21 PAP – Прочий картон
	Бинт
	Отсутствие латекса
	Хлопок

Упаковка

Каждый бинт когезивный (самофиксирующиеся) ОМНИБИНТ® скатывается или наматывается на втулки, изготовленные из картона (марка «Yinhe», производитель «Anji Yinhe Printing Factory»), затем упаковывается в индивидуальную упаковку (ориентированный полипропилен (OPP) (марка «Changxiang», производитель «Anji County Changxiang color printing factory») различных размеров (таблица 3), затем упаковывается в потребительскую вторичную упаковку (коробочка) различных размеров (таблица 4) поштучно или по 6 штук в групповую упаковку (коробка) различных размеров (таблица 5), изготовленные из картона (марка «Yinhe», производитель «Anji Yinhe Printing Factory»).

Допустимое отклонение размеров упаковок бинтов когезивных (самофиксирующихся) ± 1 см.

Т а б л и ц а 3

Размер бинта	Размер упаковки
2,5 см * 3 м	9 * 10,5 см
5 см * 3 м	10 * 13,0 см
7,5 см * 3 м	10 * 15,5 см
5 см * 13 м	17 * 18,0 см
7,5 см * 13 м	17 * 19,5 см
10 см * 13 м	17 * 21,5 см

Т а б л и ц а 4

Размер бинта	Размер упаковки
2,5 см * 3 м	5,7 * 5,7 * 4,0 см
5 см * 3 м	5,7 * 5,7 * 6,0 см
7,5 см * 3 м	5,7 * 5,7 * 8,5 см
5 см * 13 м	10,5 * 10,5 * 6,0 см

7,5 см * 13 м	10,5 * 10,5 * 8,5 см
10 см * 13 м	10,5 * 10,5 * 11,0 см

Т а б л и ц а 5

Размер бинта	Размер упаковки
5 см * 13 м	32 * 21 * 5,8 см
7,5 см * 13 м	32 * 21 * 8,3 см
10 см * 13 м	32 * 21 * 10,8 см

Каждый бинт креповый ОМНИКРЕП® упаковывается в индивидуальную упаковку (ориентированный полипропилен (OPP) (марка «Changxiang», производитель «Anji County Changxiang color printing factory») различных размеров (таблица 6), затем упаковывается в потребительскую вторичную упаковку (коробочка) различных размеров (таблица 7) поштучно или по 20 штук в групповую упаковку (коробка), изготовленную из картона (марка «Yinhe», производитель «Anji Yihe Printing Factory»,) различных размеров (таблица 8).

Допустимое отклонение размеров упаковок бинтов креповых ± 1 см.

Т а б л и ц а 6

Размер бинта	Размер упаковки
5 см * 2,25 м	6,5 * 11,5 см
7,5 см * 2,25 м	6,5 * 14,0 см
10 см * 2,25 м	6,5 * 16,5 см
15 см * 2,25 м	6,5 * 22,0 см

Т а б л и ц а 7

Размер бинта	Размер упаковки
5 см * 2,25 м	5 * 5 * 6,5 см
7,5 см * 2,25 м	5 * 5 * 9,0 см
10 см * 2,25 м	5 * 5 * 11,5 см
15 см * 2,25 м	5 * 5 * 15,9 см

Т а б л и ц а 8

Размер бинта	Размер упаковки
7,5 см * 2,25 м	22,5 * 9 * 18 см
10 см * 2,25 м	22,5 * 11,5 * 18 см

- Вскрытие упаковки должно обеспечиваться без применения режущего инструмента.

Бинты в индивидуальной или групповой упаковке должны укладываться в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514, которые оклеиваются липкой лентой.

Масса брутто ящика не должна превышать 20 кг.

При отгрузке бинтов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

Требования безопасности

Бинты не содержат веществ, представляющих непосредственную опасность для окружающей среды и здоровья человека, не оставляют на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывают аллергических или кожно-раздражающих реакций.

Санитарно-химические показатели и показатели токсикологических свойств бинтов соответствуют ГОСТ Р 52770 и серии стандартов ГОСТ ISO 10993: ГОСТ ISO 10993-1, ГОСТ ISO 10993-10, ГОСТ ISO 10993-23.

Бинты горючи согласно ГОСТ 12.1.044.

Требования охраны окружающей среды

При изготовлении бинтов отходы, представляющие опасность для окружающей среды, не образуются. Техничные и промывные воды после очистки возвращаются в начало технологического цикла.

Бинты при обращении и использовании по назначению не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, не обладают способностью образовывать токсические соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов.

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- аварийных утечек (россыпей) производственных материалов;
- неорганизованного захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

Бинты и материалы, используемые при их изготовлении, не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., ГОСТ 30775, СП 2.1.7.1386-03 и СанПиН 2.1.3684-21.

Транспортирование

Транспортирование продукции осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура – от – 50 до + 50°C;

влажность: до 100 % при 25 °C;

группа Л ГОСТ Р 51908 в части действия механических факторов.

При погрузке, выгрузке и транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие бинты от повреждений и загрязнений.

Отправка бинтов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – согласно ГОСТ 15846.

Хранение

Готовые бинты хранят в закрытых сухих складских помещениях в условиях по группе 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80%.

При погрузке, выгрузке, хранении и транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие бинты от повреждений и загрязнений.

Нормы безопасности погрузочных работ – по ГОСТ 12.3.009.

Отправка бинтов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – согласно ГОСТ 15846.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требованиям ТУ 21.20.24–001–26350513–2022 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Сведения об утилизации

Использованные бинты повторному применению не подлежат.

Бинты, не бывшие в употреблении, утилизируют по классу отходов А по СанПиН 2.1.3684-21, а бывшие в эксплуатации – по классу отходов Б

Бинты по классу отходов Б утилизируются в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель изделия _____

Производитель _____

Штамп

Номер партии / артикул _____

продавца

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Изделие проверено, упаковка повреждений не имеет.

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Номер партии изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

_____ (графа для заметок продавца)

Прошито, пронумеровано и
скреплено 3 листов

ООО «ОмниМедика»

Генеральный директор

Мух / О.А. Шуваева

« 6 » августа 2024 г.

