



Литовская Республика
Каунасский район, Кулаутува
Ул. Ивинскио 2а. LT-53486

Бинт эластичный медицинский LANA LM-1
с застежкой

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор UAB LANA MEDICALE

Ромуалдас Раинис

12 февраля 2015 г.

Инструкция пользователя

Бинт эластичный медицинский LANA LM-1 с застежкой



Кулаутува

2015г.

Бинт эластичный медицинский LANA LM-1
с застежкой

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При занятии спортом, при угрозе расширения вен, при растяжении и вывихах, травм суставов очень полезные бинты эластичные медицинские LANA LM-1

Бинт эластичный медицинский LANA LM-1 с застежкой применяется для профилактики хронических венозных воспалительных процессов в до – и послеоперационный период, для фиксации при заболеваниях суставов, для лечения травматических повреждений, вывихов, ушибов.

Обладает высокой эластичностью: растяжимость более 170%.

Комплектуется двумя алюминиевыми застежками для закрепления бинта

При покупке бинта эластичного медицинского LANA LM-1 нужно принять во внимание цель использования или совет врача и выбрать подходящий Вам из предложенного в таблице ассортимента бинтов:

Ширина, см	8	10	14
Длина, см	70, 120, 150, 200, 300, 350	150, 200, 300	150, 200, 300

Предостережение: Изделие нестерильно. Используется только для наружного применения. Нельзя накладывать на открытую рану.

Состав бинта

Хлопок	75 ± 2 %
Полиэстр	12 ± 2 %
Эластан	13 ± 2 %

Предостережение: Если повязка накладывается на незащищенную кожу, необходимо убедиться в отсутствии повреждения кожных покровов. Если на коже имеется рана, необходимо закрыть ее медицинским тампоном и заклеить пластырем.

Предостережение: Если вы заметили отек, изменение цвета кожи или почувствовали охлаждение конечности, которая находится ниже повязки, сразу же ослабьте повязку.

Предостережение: При появлении онемения, болей ощущения пульсации бинт следует перебинтовать, уменьшив силу натяжения.

Противопоказания:

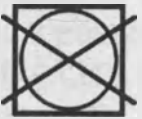
– индивидуальная непереносимость компонентов сырья изделия.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА.

Рекомендуется ручная стирка мыльным раствором при температуре не более 40°С, без использования синтетических моющих средств. Аккуратное отжимание без выкручивания. Сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности. Глажение ЗАПРЕЩЕНО.
 Рекомендуется иметь два комплекта бинтов и менять их ежедневно.

Хранение : в сухом помещении, при комнатной температуре.

Символы, используемые на упаковке:

	Номер партии
	Производитель
	Дата производства (год, месяц)
	Использовать до (год, месяц)
	Знак соответствия требованиям Европейской Директивы
Символы ухода	
	Ручная стирка при температуре воды до 40 С. Изделие не тереть. Отжимать аккуратно, без перекручивания
	Отбеливание запрещено
	Глажка запрещена
	Барабанная сушка запрещена

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в сухих помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от 0 °С до 50°С и относительной влажности не более 90% при отсутствии конденсата.

Транспортирование производится любыми видами крытого транспорта, в котором они защищены от атмосферного влияния и механических повреждений, при температуре от -50 °С до +50°С и относительной влажности не более 90% при отсутствии конденсата.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие может быть утилизировано как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями национального законодательства.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок годности изделия установлен 5 лет при соблюдении правил ухода, транспортирования и хранения, установленных производителем

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«УАБ Лана Медикале», Литовская республика.

«UAB Lana Medica».

Адрес: L.Ivinskio 2a, LT-53486, Kulautuva, Kauno raj., Lietuva.

Тел.: +370-610-30584.

Адрес электронной почты: info@lanamedicale.lt

ФИРМА, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ООО «МЕДИКОЛАЙТ»

129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1, офис 19.

Тел.: +7 (499) 9401314. e-mail: medicolait@mail.ru

Прошито и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листа (ов)

Главный врач ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»

Минздрава России

д.м.н., профессор

Сельчук В.Ю.

2015 г.