

Ланцеты «Акку-Чек® Мультикликс»

Барaban с шестью ланцетами



Информация по безопасности




Используйте ланцеты Акку-Чек Мультикликс только с устройством для прокалывания пальца Акку-Чек Мультикликс.




Чтобы избежать попадания инфекции, используйте каждый раз для получения капли крови новый ланцет. Использование ланцета один раз позволяет добиться практически безболезненного прокола кожи.


Установка барабана с ланцетами

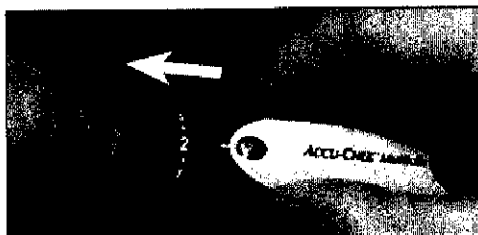

Снимите колпачок с устройства для прокалывания пальца.

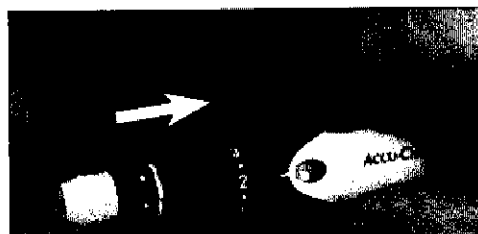

Установите новый барабан с ланцетами – синим кольцом по направлению к устройству, в устройство для прокалывания пальца.

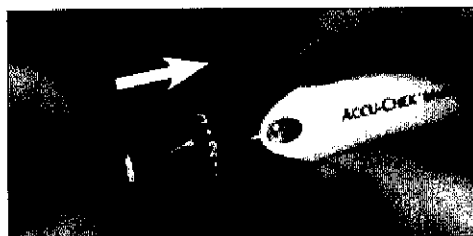

Установите колпачок на место до упора. Убедитесь, что Вы совместили выемку колпачка устройства для прокалывания пальца с выступающим контуром на передней части устройства для прокалывания пальца. Каждый барабан содержит 6 ланцетов. Первый ланцет теперь готов к использованию.



На шкале на кнопке взведения изображено пять белых полос, сообщающих о том, что в барабане находится пять неиспользованных ланцетов.

Установка следующего ланцета



Поверните кнопку взведения один раз на четверть до упора, а потом назад. Второй ланцет теперь готов к использованию. Поступайте так, как описано выше, меняя по очереди ланцеты.

Каждый раз, когда новый ланцет готов к работе, число белых полос на шкале сокращается на одну. Когда на шкале не осталось ни одной белой полосы, это означает, что Вы использовали пять ланцетов. Шестой и последний ланцет находится на своем месте и готов к использованию.