

8

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

«Рош Диагностика Рус»

О.В.Нестеров

«13» апреля 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения: Ланцеты к устройству для прокалывания пальца «Акку-Чек Мультикликс» (Accu-Chek Multiclix)

Ланцеты «Акку-Чек® Мультикликс»

Барaban с шестью ланцетами



Информация по безопасности




Используйте ланцеты Акку-Чек Мультикликс только с устройством для прокалывания пальца Акку-Чек Мультикликс.




Чтобы избежать попадания инфекции, используйте каждый раз для получения капли крови новый ланцет. Использование ланцета один раз позволяет добиться практически безболезненного прокола кожи.


Установка барабана с ланцетами

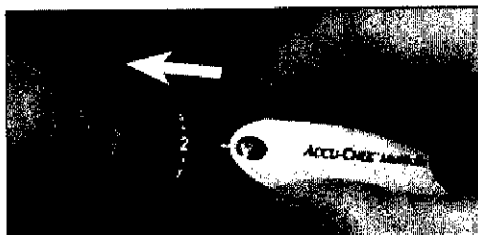

Снимите колпачок с устройства для прокалывания пальца.

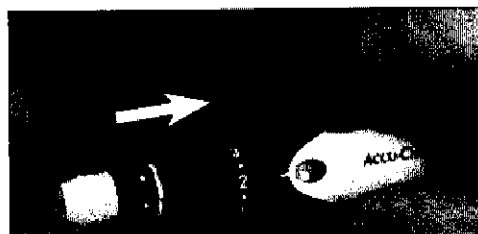

Установите новый барабан с ланцетами – синим кольцом по направлению к устройству, в устройство для прокалывания пальца.

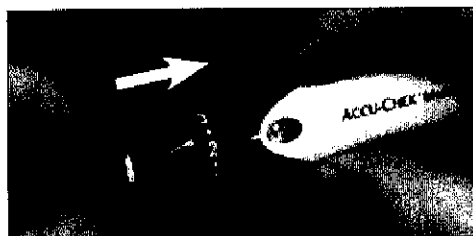

Установите колпачок на место до упора. Убедитесь, что Вы совместили выемку колпачка устройства для прокалывания пальца с выступающим контуром на передней части устройства для прокалывания пальца. Каждый барабан содержит 6 ланцетов. Первый ланцет теперь готов к использованию.



На шкале на кнопке взведения изображено пять белых полос, сообщающих о том, что в барабане находится пять неиспользованных ланцетов.


Установка следующего ланцета



Поверните кнопку взведения один раз на четверть до упора, а потом назад. Второй ланцет теперь готов к использованию. Поступайте так, как описано выше, меняя по очереди ланцеты.

Каждый раз, когда новый ланцет готов к работе, число белых полос на шкале сокращается на одну. Когда на шкале не осталось ни одной белой полосы, это означает, что Вы использовали пять ланцетов. Шестой и последний ланцет находится на своем месте и готов к использованию.

Замена барабана с ланцетами

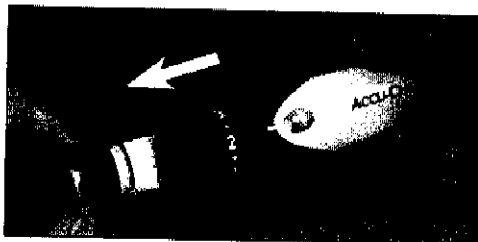

Снимите колпачок с устройства для прокалывания пальца. Держите барабан с ланцетами большим и указательным пальцами и извлеките его из устройства для прокалывания пальца. После того, как Вы его извлекли, синее кольцо отделилось от белого цилиндра и движется свободно. На цилиндре появились две красные полосы. Установите в устройство новый барабан с ланцетами (см. Установка барабана с ланцетами).

Подготовка к получению капли крови

Самым лучшим местом для получения капли капиллярной крови являются кончики пальцев. Мы рекомендуем использовать для получения капли крови боковые поверхности кончиков пальцев, так как в этих местах минимальны болезненные ощущения, возникающие при проколе. Также у Вас есть возможность использовать образцы капиллярной крови, полученной из альтернативных мест, таких как плечо, предплечье, область большого пальца на ладони, часть ладони напротив области большого пальца, бедра или икр ног.

Измерение уровня глюкозы крови с использованием крови, полученной из альтернативных мест, называется Alternative Site Testing (AST). Вымойте руки теплой водой и вытрите их насухо. Это будет способствовать лучшей циркуляции крови и выполнению гигиенических требований.

Получите каплю крови в соответствии с Руководством Пользователя, прилагаемым к устройству для прокалывания пальца Акку-Чек Мультикликс.

Последующий уход за местом прокола

Протрите место прокола сухой чистой салфеткой и следите за тем, чтобы в дальнейшем оно оставалось чистым.

Расшифровка символов



Пожалуйста, прочтите эти примечания с особым вниманием



Исключительно для индивидуального использования



Ланцеты могут быть использованы только до окончания срока годности, указанного на упаковке



Номер лота



Ланцеты были стерилизованы гамма излучением 25 kGy



Данная продукция отвечает требованиям Директивы 93/42/EEC от 14 июня 1993 года в отношении медицинских приборов

Патенты:

В США и многих других странах, компания «Рош Диагностика» запатентовала устройство для прокалывания пальца Акку-Чек Мультикликс, или патенты находятся в стадии получения. Ланцеты Акку-Чек Мультикликс Вы можете использовать только с устройством для прокалывания пальца Акку-Чек Мультикликс.

Информация о заказе:

Ланцеты «Акку-Чек Мультикликс №24»

REF 04778685001

Ланцеты «Акку-Чек Мультикликс №102»

REF 04778642001

Последнее обновление: январь 2010

Поставщик:

107031 Москва, Трубная площадь, 2

Бизнес-центр «Неглинная Плаза»,

ООО «Рош Диагностика Рус»

Информационный центр:

8-800-200-88-99

(звонок бесплатный для всех регионов России), (495) 258-27-89

Акку-Чек и Акку-Чек Мультикликс являются товарными знаками фирмы Рош.



Рош Диагностика GmbH
D-68298 Маннхайм, Германия
www.accu-chek.com

Только сертифицированный Рег. ул. ст.с. № 2006/06 от 23.01.2006