



ИЗР. - 07404-1200505-06



**Шприц
инъекционный трехдетальный
однократного применения**

Инструкция по эксплуатации:

- Перед применением проверить целостность потребительской тары шприца, при нарушении шприц не применять.
- Вскрыть потребительскую тару, извлечь шприц.
 - Плотнo надеть на конус шприца иглу, снять колпачок.
 - Набрать в шприц лекарственный препарат.
 - Расположить шприц с иглой вертикально; выдавить, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.
 - После инъекции шприц уничтожить.



ИЗР. - 07404-1200505-06



**Шприц
инъекционный двухдетальный
однократного применения**

Инструкция по эксплуатации:

- Перед применением проверить целостность потребительской тары шприца, при нарушении шприц не применять.
- Вскрыть потребительскую тару, извлечь шприц.
 - Плотнo надеть на конус шприца иглу, снять колпачок.
 - Набрать в шприц лекарственный препарат.
 - Расположить шприц с иглой вертикально; выдавить, нажимая на шток-поршень, пузырьки воздуха.
 - После инъекции шприц уничтожить.

Handwritten signature