

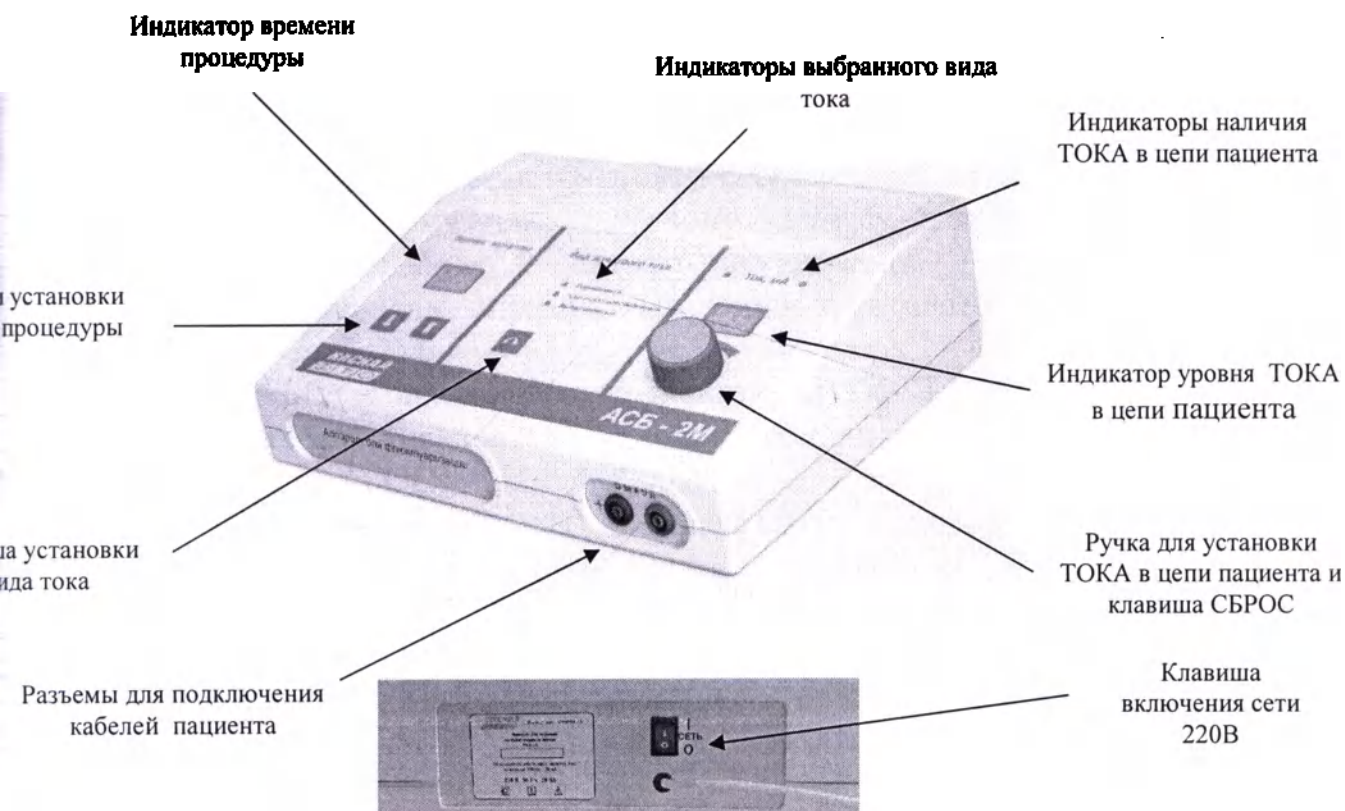


Рис.1
Аппарат для флюктуаризации «АСБ-2М»

Габаритные размеры аппарата 290x214x90 мм., масса аппарата не более 3 кг.

2. Описание принципа действия изделия.

Принцип действия аппарата для флюктуаризации «АСБ-2М» основан на формировании необходимого вида тока и воздействии им на пациента.

Необходимый вид тока формируется программным способом в блоке управления аппарата и поступает в блок широкополосного усилителя тока.

После фильтрации и усиления требуемый вид тока подводится к пациенту через однополюсные разъемы и кабель пациента.

Регулировка тока обеспечивается цифровым регулятором.

После начала процедуры блок управления начинает отсчет времени процедуры и после ее окончания выдает звуковой сигнал.

Информация о параметрах воздействующего тока на этапе установки и на этапе проведения процедуры выводится на цифровой дисплей.